

PRD-WÖRTER DES MONATS

gelb – rot – blau

METACOM-SYMBOLE

gelb 	rot 	blau 
---	--	---

QUASSELKISTE 45 V2.0

gelb  QK45 V2.0 2018.03	rot  QK45 V2.0 2018.03	blau  QK45 V2.0 2018.03
--	---	--

QUASSELKISTE 60 NEU

gelb  QK60 NEU 2018.03	rot  QK60 NEU 2018.03	blau  QK60 NEU 2018.03
---	--	---



WORTSTRATEGIE 84 NEU

gelb  WS84 NEU 2018.03	rot  WS84 NEU 2018.03	blau  WS84 NEU 2018.03
---	--	---

LOGOFOXX 50

gelb  LGF50 2018.03	rot  LGF50 2018.03	blau  LGF50 2018.03
--	---	--

LOGOFOXX 60

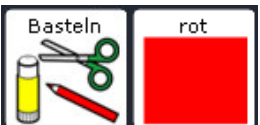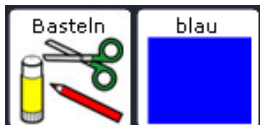gelb  LGF60 2018.03	rot  LGF60 2018.03	blau  LGF60 2018.03
--	---	--

PRD-WÖRTER DES MONATS

gelb – rot – blau

BEIM MALEN

Lassen Sie den UK-Benutzer beim gemeinsamen Malen entscheiden, welche Farbe als nächstes benutzt werden soll, z.B. „jetzt - rot“ oder „ich will - gelb“.

BEIM WÜRFELN

Bei Spielen mit einem Farbwürfel kann der UK-Benutzer das Würfelergebnis kommentieren, z.B. „blau – das ist gut“ oder „grün – brauchen wir nicht mehr“.

BEIM SPIEL AUF DEM AUTOTEPPICH

Beim gemeinsamen Spielen mit Autos kann der UK-Benutzer steuern, ob die Fahrzeuge fahren dürfen. Bei „rot“ müssen alle stehen bleiben, bei „grün“ dürfen die Autos wieder fahren.

„WELCHE FARBE DARF ES SEIN?“ (PRD-IDEE DEZEMBER 2014)

„Verwalten“ Sie z.B. Bauklötze, Perlen oder Smarties in verschiedenen Farben. Lassen Sie Ihren UK-Benutzer eine Farbe wählen und bauen Sie auf diese Weise z.B. gemeinsam einen Turm, fädeln Sie eine Perlenkette auf oder verzieren Sie ein Pfefferkuchenhaus.

„MASKENBALL“ (PRD-IDEE JANUAR 2016)

Basteln Sie gemeinsam mit Ihrem UK-Benutzer eine bunte Faschingsmaske. Lassen Sie den Benutzer entscheiden, ob z.B. „viel blau“ oder „wenig blau“ verwendet werden soll.

„AUF DIE FARBE KOMMT ES AN!“ (PRD-IDEE MÄRZ 2017)

Bei diesem Bewegungsspiel werden Luftballons eingefangen - hierbei kommt es auf die richtige Farbe an.

„MALEN ZUR MUSIK“ (BEST OF PRD-IDEEN DES MONATS KAPITEL 2 TIPP 3)

Bei dieser Aktivität wird gemeinsam gemalt, und zwar zur Musik.

„AN DER AMPEL“ (BEST OF PRD-IDEEN DES MONATS KAPITEL 8 TIPP 3)

Im Rollenspiel können die teilnehmenden Personen lernen, wie sie sich an einer Ampel verhalten müssen: „es ist rot – ich muss stehen“, „es ist grün – ich darf gehen“.

PRD-IDEEN DES MONATS

gelb – rot – blau

Farben entdecken

Bei diesem Spiel begeben sich die Teilnehmer auf die Suche nach verschiedenen Farben – egal ob im Klassenzimmer, in der Turnhalle, im Wohnzimmer oder im Garten.

DIESE PRD-PRODUKTE KÖNNEN EINGESETZT WERDEN:

- 1-2 sprechende Tasten (z.B. BIGmack oder Step-by-Step)
- GoTalk9+, GoTalk20+ oder SuperTalker
- Minspeak-Anwendungsprogramme „Quasselkiste 45 / 60“ oder „Wortstrategie 84“
- Anwendungsprogramme „LoGoFoXX 50“ oder „LoGoFoXX 60“

DAS GEHÖRT ZUR VORBEREITUNG:

- Beim Einsatz sprechender Tasten kennzeichnen Sie die Geräte mit Symbolen und nehmen die entsprechenden Aussagen auf.
- Zur Benutzung des GoTalks bzw. SuperTalkers verwenden Sie das beigegefügte Deckblatt. Besprechen Sie das Gerät gemäß den Vorschlägen.
- Verwendet Ihr Talkerbenutzer ein Anwendungsprogramm, drucken Sie die Datei mit den Sequenzen des entsprechenden Programms aus.

JETZT KANN ES LOSGEHEN!

- Ziel des Spiels ist es, verschiedene Farben in der Umgebung zu entdecken.
- Hierfür übernimmt ein UK-Benutzer die Aufgabe anzusagen, nach welcher Farbe gesucht werden soll, z.B. „Was ist gelb?“ oder „Was ist rot?“
- Daraufhin sucht jeder Teilnehmer einen entsprechend farbigen Gegenstand und bleibt bei diesem stehen.
- Sobald alle fündig geworden sind, stellen sich die Teilnehmer gegenseitig vor, was sie entdeckt haben, z.B. „Vorhang gelb“ oder „Ball rot“.
- Gemeinsam überlegt die Gruppe, welche Beschreibungen noch zu dem gefundenen Gegenstand passen, z.B. „Vorhang lang – auf machen – zu machen“ oder „Ball spielen – Tor machen“.
- Nun wird eine neue Farbe ausgesucht und die Suche beginnt erneut.

SO KANN ES WEITERGEHEN:

Vermitteln Sie die Bezeichnung von Farben ebenfalls in anderen Spiel- und Alltagssituationen. Weitere Ideen finden Sie in dieser Datei auf Seite 2.

Die „PRD-Ideen des Monats“ sind ein kostenloser Service der Prentke Romich GmbH. Nutzung auf eigene Gefahr. Die Prentke Romich GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die aus der Befolgung der hier gemachten Angaben resultieren könnten. Das Ein- bzw. Austragen in den Newsletter erfolgt unter www.prentke-romich.de.

Prentke Romich GmbH

Elektronische Kommunikationshilfen

Goethestr. 31

34119 Kassel

Tel. (0561) 78559-0


Fax (0561) 78559-29

E-Mail info@prentke-romich.de

Web www.prentke-romich.de



Tastensymbol für eine sprechende Taste

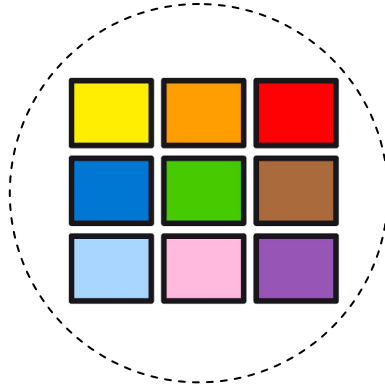


Was ist gelb?
Was ist blau?
Was ist grün?
Was ist rot?
Was ist schwarz?

Tastensymbole für zwei sprechende Tasten



Quatsch!
Such nochmal!

Herzlichen
Glückwunsch!

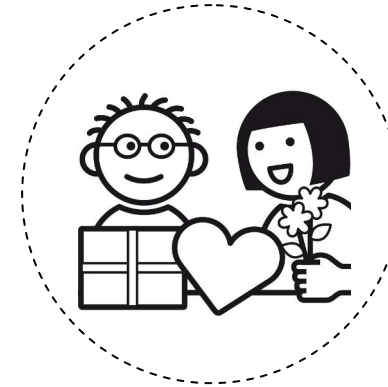

Feld 1: „Was ist blau?“

Feld 2: „Was ist gelb?“

Feld 3: -



Feld 4: „Was ist rot?“

Feld 5: -

Feld 6: „Was ist schwarz?“

Feld 7: „Was ist grün?“

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Feld 8: -

SuperTalker				© Prentke Romich GmbH 2018		Symbole: Annette Kitzing	
							
							
EBENE 		Farben entdecken		TASTEN 			

*individuelles
Kernvokabular*

*individuelles
Kernvokabular*

*individuelles
Kernvokabular*



Was ist gelb?

Was ist blau?

Was ist schwarz?

Was ist rot?

Was ist grün?

individuelles
Kernvokabular

individuelles
Kernvokabular

individuelles
Kernvokabular

individuelles
Kernvokabular

individuelles
Kernvokabular



Was ist blau?

Was ist grün?

Was ist rot?

Was ist schwarz?

Was ist gelb?

Quatsch! Such nochmal!

Herzlichen Glückwunsch!


was



QK45 V2.0

2018.03

ist

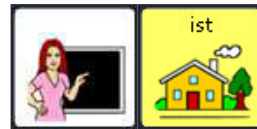

QK45 V2.0

2018.03

gelb



QK45 V2.0

2018.03


rot



QK45 V2.0

2018.03

blau

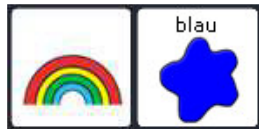

QK45 V2.0

2018.03

grün



QK45 V2.0

2018.03


schwarz



QK45 V2.0

2018.03

Quatsch

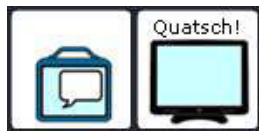

QK45 V2.0

2018.03

Herzlichen Glückwunsch!




QK45 V2.0

2018.03

das ist



richtig

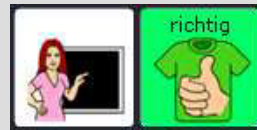

QK45 V2.0 2018.03

das ist



falsch



QK45 V2.0 2018.03


du musst




nochmal



suchen

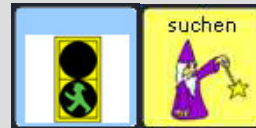

QK45 V2.0 2018.03

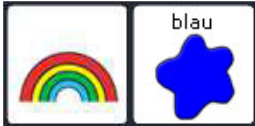was  QK60 NEU 2018.03	ist  QK60 NEU 2018.03	gelb  QK60 NEU 2018.03	rot  QK60 NEU 2018.03
blau  QK60 NEU 2018.03	grün  QK60 NEU 2018.03	schwarz  QK60 NEU 2018.03	
Quatsch!  QK60 NEU 2018.03	Herzlichen Glückwunsch!  QK60 NEU 2018.03		

das  ist   richtig   

QK60 NEU 2018.03

das  ist   falsch   

QK60 NEU 2018.03

du musst   noch mal   suchen   

QK60 NEU 2018.03

was



WS84 NEU

2018.03

ist



WS84 NEU

2018.03

gelb



WS84 NEU

2018.03

rot



WS84 NEU

2018.03

blau



WS84 NEU

2018.03

grün



WS84 NEU

2018.03

schwarz



WS84 NEU

2018.03

Quatsch!



WS84 NEU

2018.03

Herzlichen Glückwunsch!



WS84 NEU


2018.03

das  ist   richtig   

WS84 NEU 2018.03

das  ist   falsch   

WS84 NEU 2018.03

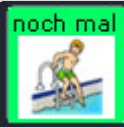du musst   noch mal   suchen   

WS84 NEU 2018.03

was  LGF50 2018.03	ist  LGF50 2018.03	gelb  LGF50 2018.03	rot  LGF50 2018.03
blau  LGF50 2018.03	grün  LGF50 2018.03	schwarz  LGF50 2018.03	
Quatsch!  LGF50 2018.03	Herzlichen Glückwunsch!  LGF50 2018.03		

das ist   Floskeln das ist richtig  Adjektive  richtig LGF50 2018.03

das ist   Floskeln das ist falsch  Adjektive  falsch LGF50 2018.03

du musst  du  du musst noch mal  Adverbien  noch mal suchen  Verben  Verben  suchen LGF50 2018.03

was



LGF60

2018.03


ist



LGF60

2018.03


gelb

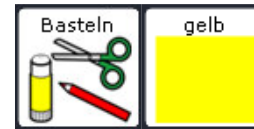

LGF60

2018.03


rot

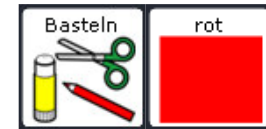

LGF60

2018.03

blau

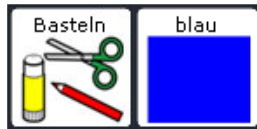

LGF60

2018.03


grün



LGF60

2018.03


schwarz

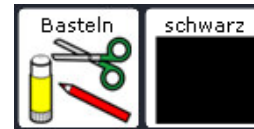

LGF60

2018.03

Quatsch!

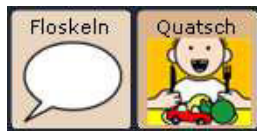

LGF60

2018.03

Herzlichen Glückwunsch!



LGF60

2018.03

das ist   richtig   LGF60 2018.03

das ist   falsch   LGF60 2018.03

du musst   nochmal   suchen    LGF60 2018.03