# PRD-IDEEN DES MONATS

# So geht es mir!

Über Gefühle und Befindlichkeiten zu sprechen, ist nicht einfach. Nutzen Sie Bildkarten verschiedener Situationen, um gemeinsam zu überlegen, wie es den abgebildeten Personen wohl geht und was sie sagen könnten.

#### DIESE PRD-PRODUKTE KÖNNEN EINGESETZT WERDEN:

- sprechende Taste (z.B. Step-by-Step)
- ➤ GoTalk9+, GoTalk20+, SuperTalker
- Minspeak-Anwendungsprogramm "Quasselkiste 32"
- Minspeak-Anwendungsprogramm "Quasselkiste 45"
- Minspeak-Anwendungsprogramm "Quasselkiste 60"
- Minspeak-Anwendungsprogramm "Wortstrategie 84"

#### DAS GEHÖRT ZUR VORBEREITUNG:

- > Drucken Sie die Bildkarten der verschiedenen Situationen aus.
- ➤ Drucken Sie beim Einsatz einer sprechenden Taste, eines GoTalks oder eines SuperTalkers die Bildkarten der verschiedenen Gefühle und Befindlichkeiten aus.
- Verwendet eine Person einen GoTalk oder SuperTalker, drucken Sie das beigefügte Deckblatt aus. Besprechen Sie das Gerät gemäß den Vorschlägen.
- Verwendet eine Person ein Anwendungsprogramm, drucken Sie die Satzstreifen des entsprechenden Programms aus.
- Entscheiden Sie sich zunächst für zwei oder drei verschiedene Situationen. Wählen Sie mehrere Aussagen aus, die zu diesen unterschiedlichen Situationen passen könnten (z.B. Eiscafé: "Wie lecker!", "Das macht Spaß!", "Voll cool!" / Raufen: "Lass das!", "Du bist doof!", "Hilfe").
- ➤ Halten Sie die entsprechenden Bildkarten (für Benutzer einer sprechenden Taste, eines GoTalks oder eines SuperTalkers) bzw. Satzstreifen (Benutzer eines Anwendungsprogramms) bereit.
- ➤ Beim Einsatz einer sprechenden Taste kennzeichnen Sie das Gerät mit dem Symbol und nehmen die von Ihnen ausgewählten Aussagen schrittweise auf.

#### **JETZT KANN ES LOSGEHEN!**

- ➤ Zeigen Sie der Gruppe die verschiedenen Situationen, die Sie ausgewählt haben. Erzählen Sie, dass Sie gemeinsam überlegen werden, wie es den Personen in der Situation wohl geht und was sie sagen könnten.
- Legen Sie die Bildkarten bzw. Satzstreifen in die Mitte des Tisches.
- ➤ Nimmt ein Benutzer einer sprechenden Taste teil, so liest er die erste Aussage vor (z.B. "Voll cool!"). Die Teilnehmer haben nun die Aufgabe, die entsprechende Bildkarte ("cool") zu finden. Sobald sie gefunden worden ist, sprechen Sie gemeinsam darüber, zu welcher der Situationen die Aussage passen könnte. Legen Sie die Aussage zu der Situation.
- ➢ Benutzt ein Teilnehmer einen GoTalk, SuperTalker oder ein Anwendungsprogramm, so wird zuerst eine Bildkarte bzw. ein Satzstreifen aus der Mitte ausgewählt. Dann liest der Benutzer die Bildkarte bzw. den Satzstreifen mittels seiner Kommunikationshilfe vor. Sprechen Sie nun gemeinsam darüber, zu welcher der Situationen die Aussage passen könnte. Legen Sie die Aussage zu der Situation.
- ➤ Wurden alle Bildkarten bzw. Satzstreifen verteilt, so liest eine Person noch mal alle Aussagen vor, die einer Situation zugeordnet worden sind.
- ➤ Benutzer eines Anwendungsprogramms sowie sprechende Teilnehmer können nun noch weitere Aussagen ergänzen, die die Personen in der Situation benutzen könnten.



# **PRD-IDEEN DES MONATS**

#### SO KANN ES WEITERGEHEN:

Um unsere Talkerbenutzer effektiv in ihrer Kommunikationsentwicklung zu unterstützen, haben wir für alle Minspeak-Anwendungsprogramme ein Zielvokabular entwickelt. Es besteht aus ca. 400 Wörtern, die sich flexibel und spontan in unterschiedlichen Situationen einsetzen lassen. Das Zielvokabularposter ist im Lieferumfang unserer Talker enthalten und kann auf unserer Homepage im Bereich Download heruntergeladen werden.

Darüber hinaus haben wir 12 Wortschatzmodule entwickelt, in denen 150 Wörter des Zielvokabulars wiederzufinden sind, um das Erlernen dieser Wörter zu erleichtern. Hiermit ist es möglich, über einen bestimmten Zeitraum eine Kommunikationsfunktion in den Fokus zu rücken:

#### **KOMMUNIKATIONSFUNKTIONEN**

- 1. Erstes Steuern einer Interaktion
- 2. Sich selbst, andere Personen und Besitzverhältnisse bezeichnen
- 3. Widersprechen und Protest ausdrücken
- 4. Zeitliche Aspekte einer Aktivität steuern
- 5. Um eine Handlung bitten oder eine Handlung steuern
- 6. Eine Handlung beschreiben oder kommentieren
- 7. Gegenstände bemerken und darum bitten
- 8. Positionen bezeichnen oder bestimmen
- 9. Um eine Information bitten
- 10. Befindlichkeiten oder Gefühle ausdrücken
- 11. Spezifische Tätigkeiten bezeichnen oder steuern
- 12. Erweiterte Zeitkonzepte ausdrücken

#### **WORTVORSCHLÄGE**

noch mal, fertig, mehr, genug, anders, weg, da, halt, helfen, allein, was, das, machen

ich, bin, mein, du, bist, dein, er, sie, wir, eigener Name, Name 1, Name 2, Mama, Papa, Bruder, Schwester, Oma, Opa, Freund, Lehrer, für

nicht, anders, falsch, kein, doch, Quatsch

langsam, schnell, jetzt, dann, warten, machen

kommen, gehen, geben, machen, finden, zeigen, sehen, brauchen, sagen, und, oder, zusammen, allein, mit

gut, schlecht, heiß, kalt, groß, klein, nass, trocken, schwer, leicht, neu, alt, schnell, langsam, voll, leer, falsch, richtig, toll, doof, laut, leise, schmutzig, sauber, lang, kurz, viel, wenig, kaputt, und

bitte, haben, möchten, auch, mehr, alle, etwas, ein, der/die/das

an, aus, auf, zu, oben, unten, weg, da, hinter, vor, bei, in, über, unter, draußen

fragen, wer, wann, wo, warum, wie, was, wie viel

bin, bist, ist, sind, haben, Angst, Spaß, Schmerz, Hunger, Durst, traurig, glücklich, gut, schlecht, müde, langweilig, ärgern, freuen, lecker, eklig

erzählen, arbeiten, essen, fahren, hören, kaufen, kochen, lesen, schreiben, malen, schlafen, schwimmen, spielen, trinken, sitzen, stehen, gehen, tragen, können, müssen, und, oder


heute, gestern, morgen, früh, spät, Vormittag, Nachmittag, Abend, Nacht, war

Die beschriebene Aktivität eignet sich besonders gut, um die Kommunikationsfunktion 10 "Befindlichkeiten oder Gefühle ausdrücken" zu vermitteln. Zeigen Sie Ihrem Talkerbenutzer immer wieder in verschiedenen Alltagssituationen, wie er seine Kommunikationshilfe einsetzen kann, um seine Befindlichkeiten oder Gefühle auszudrücken.


Die "PRD-Ideen des Monats" sind ein kostenloser Service der Prentke Romich GmbH. Nutzung auf eigene Gefahr. Die Prentke Romich GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die aus der Befolgung der hier gemachten Angaben resultieren könnten. Das Ein- bzw. Austragen in den Newsletter erfolgt unter www.prentke-romich.de.

Prentke Romich GmbHGoethestr. 31Fax(0561) 78559-29Elektronische34119 KasselE-Mailinfo@prentke-romich.deKommunikationshilfenTel. (0561) 78559-0Webwww.prentke-romich.de




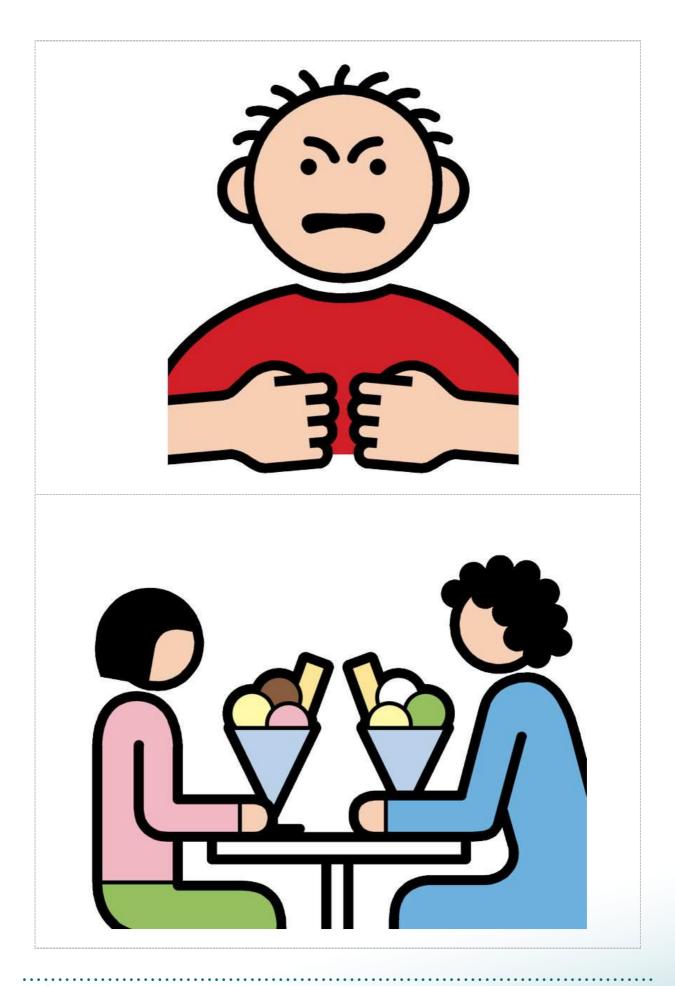




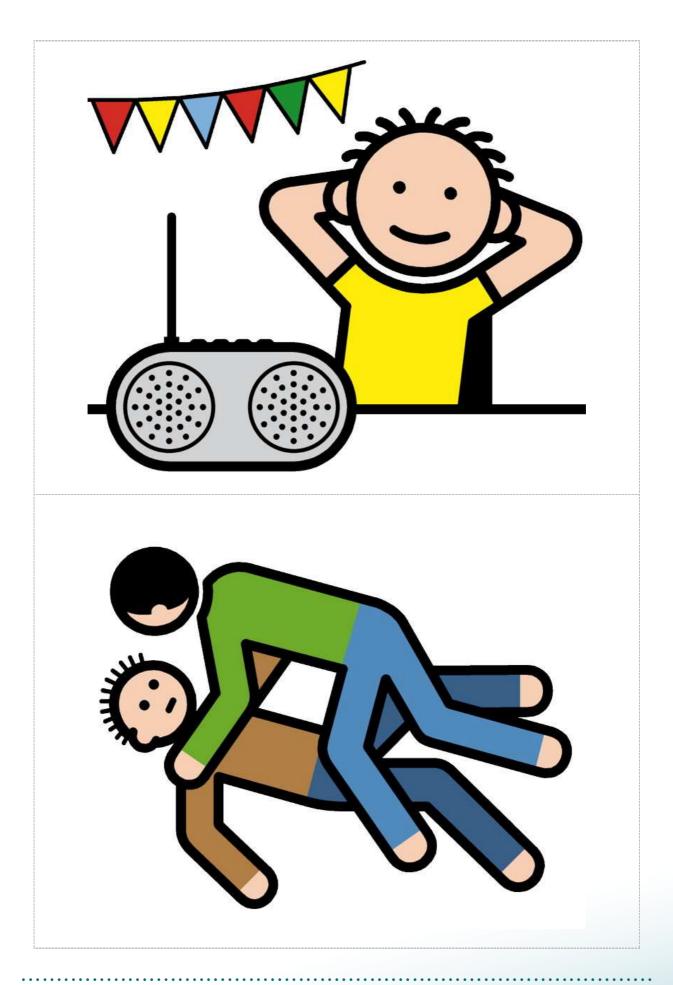




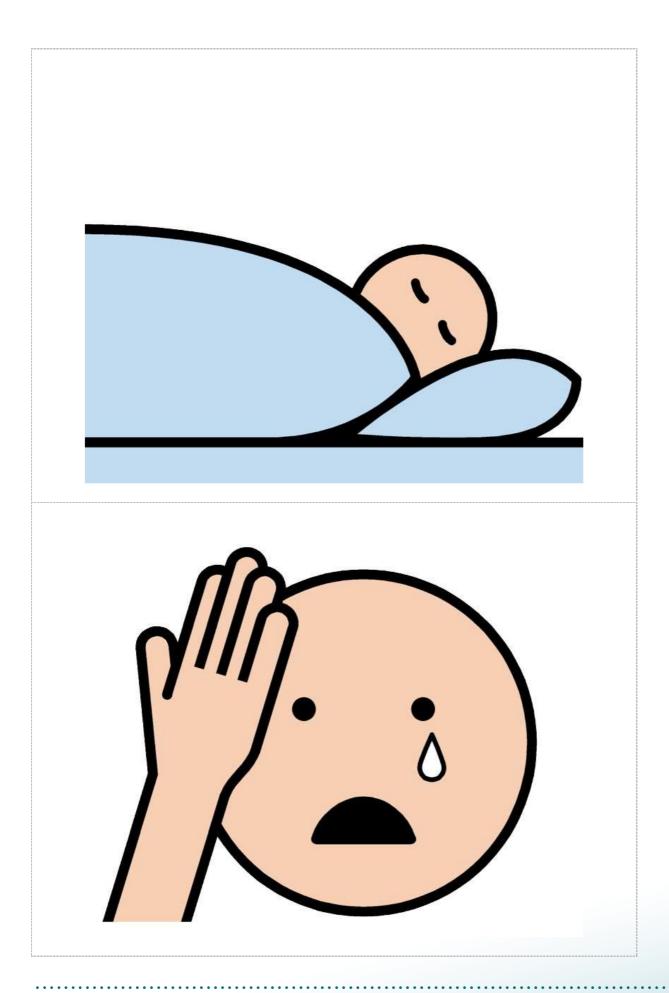




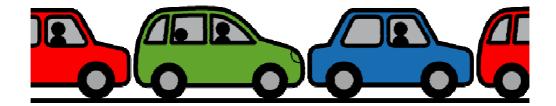

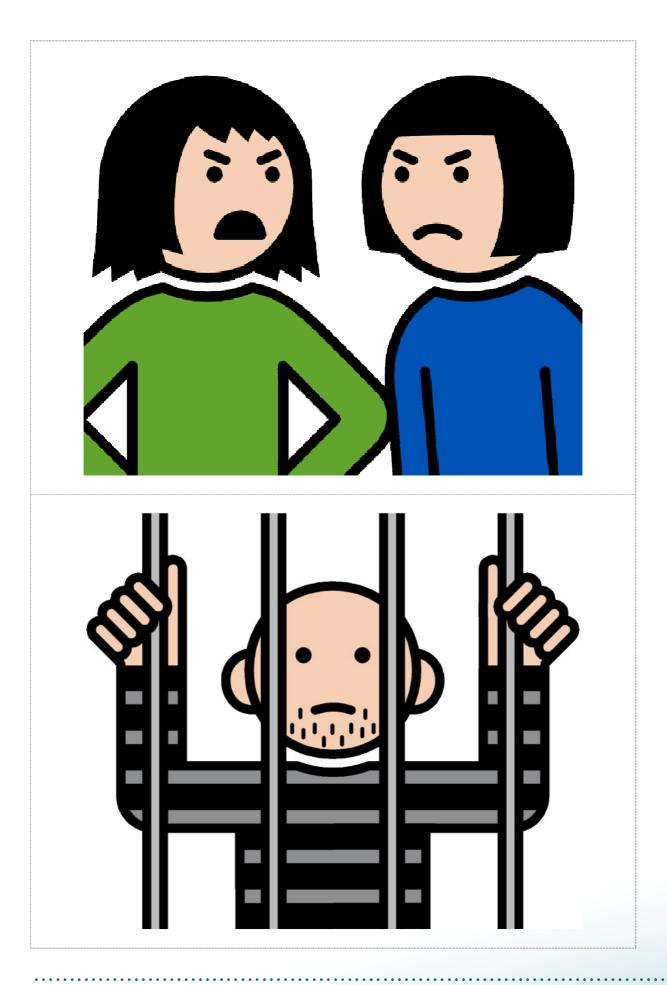




## BILDKARTEN (GEFÜHLE / BEFINDLICHKEITEN) FÜR "PRD-IDEEN DES MONATS" DEZEMBER 2012

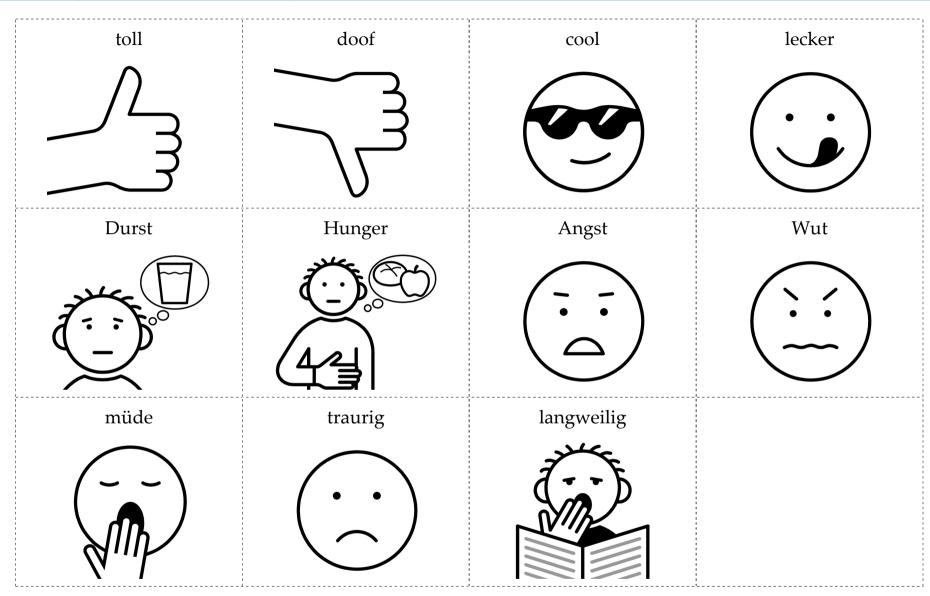

### TASTENSYMBOL FÜR "PRD-IDEEN DES MONATS" DEZEMBER 2012

Tastensymbol für eine sprechende Taste (Nehmen Sie eine Auswahl der vorgeschlagenen Aussagen schrittweise auf.)

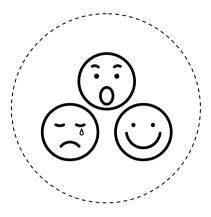

Echt toll!

Voll doof!

Voll cool!

Wie lecker!

Ich habe Durst!

Ich habe Hunger!

Ich habe Angst!

Ich bin sauer!

Ich bin so müde!

Ich bin traurig!

Mir ist langweilig!

### DECKBLATT FÜR "PRD-IDEEN DES MONATS" DEZEMBER 2012

Feld 1: "Echt toll!"

Feld 2: "Ich bin so müde!"

Feld 3: "Ich habe Durst!"


Feld 4: "Ich bin sauer!"

Feld 5: "Voll doof!"


Feld 6: "Ich bin traurig!"


Feld 7: "Ich habe Hunger!"

Feld 8: "Ich habe Angst!"

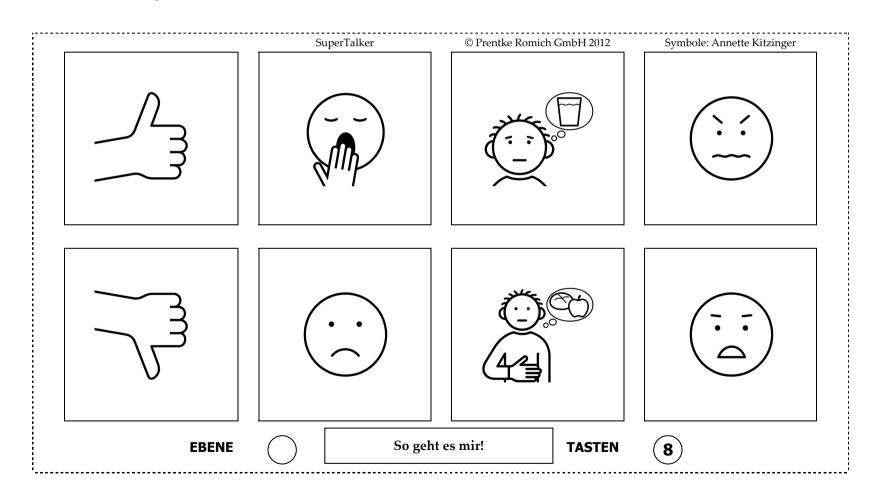

Echt toll! Voll doof! Voll cool! Ich habe Durst! Ich habe Hunger! Ich habe Angst! Ich bin sauer! Ich bin so müde! Ich bin traurig!

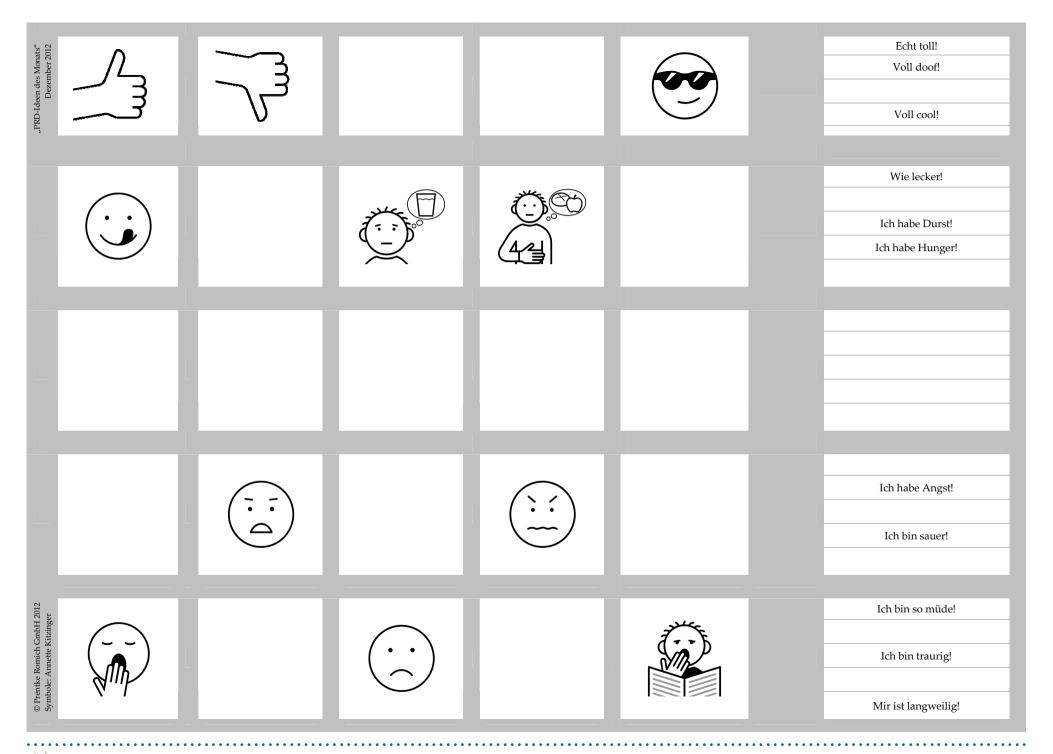

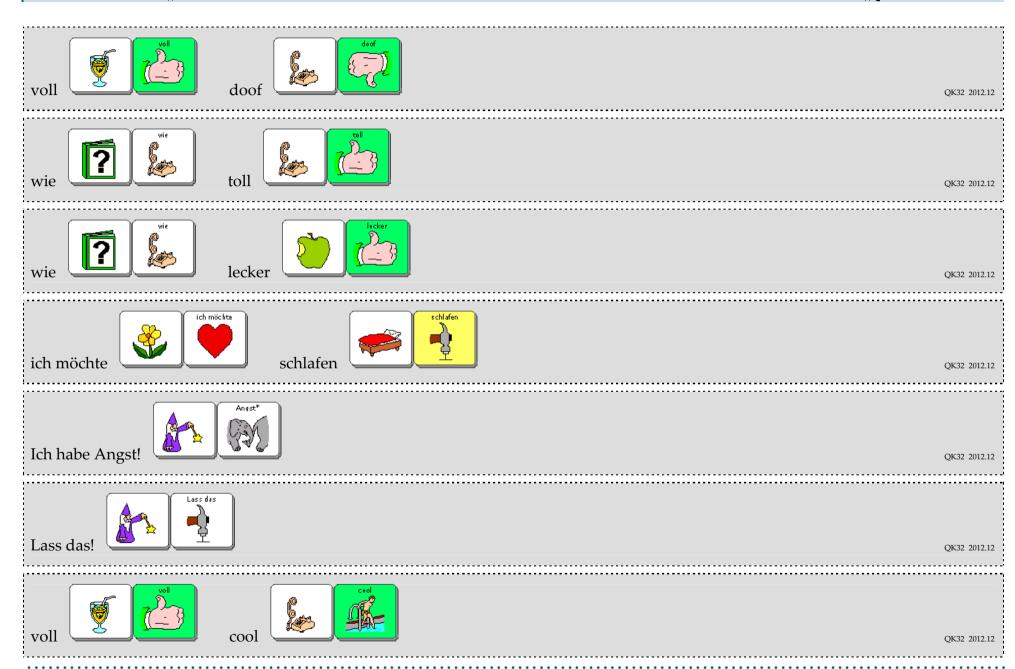







Ich bin sauer!

OK32 2012.12







QK32 2012.12








Ich habe Durst!


OK32 2012




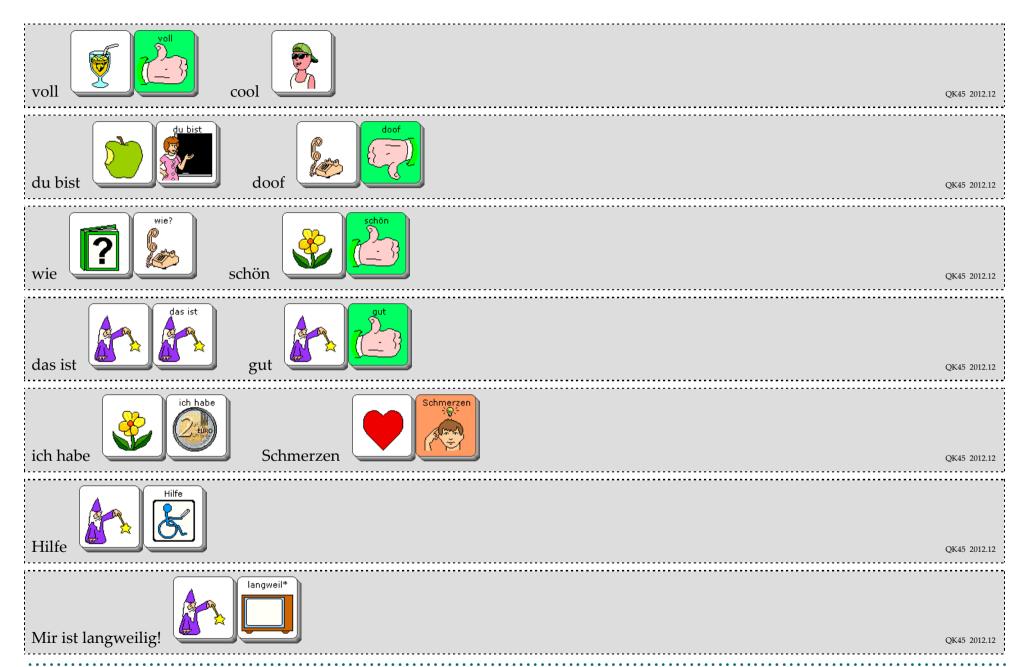


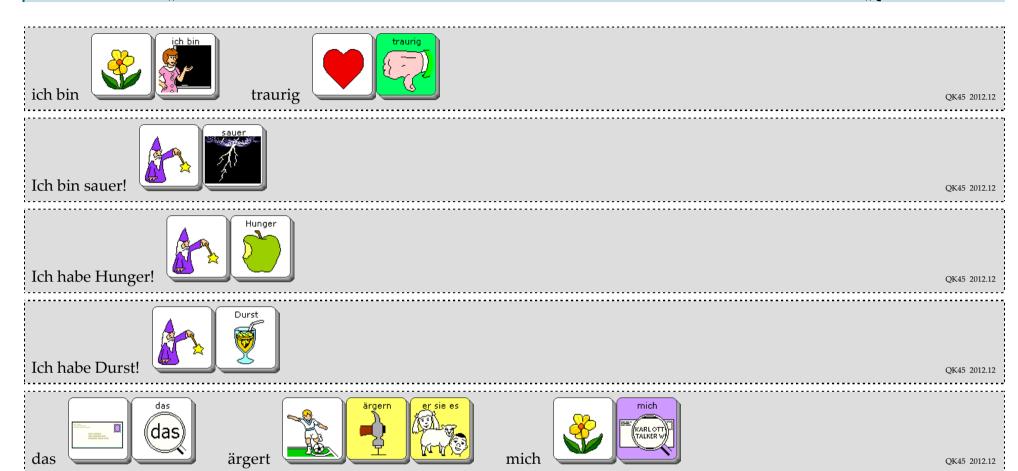


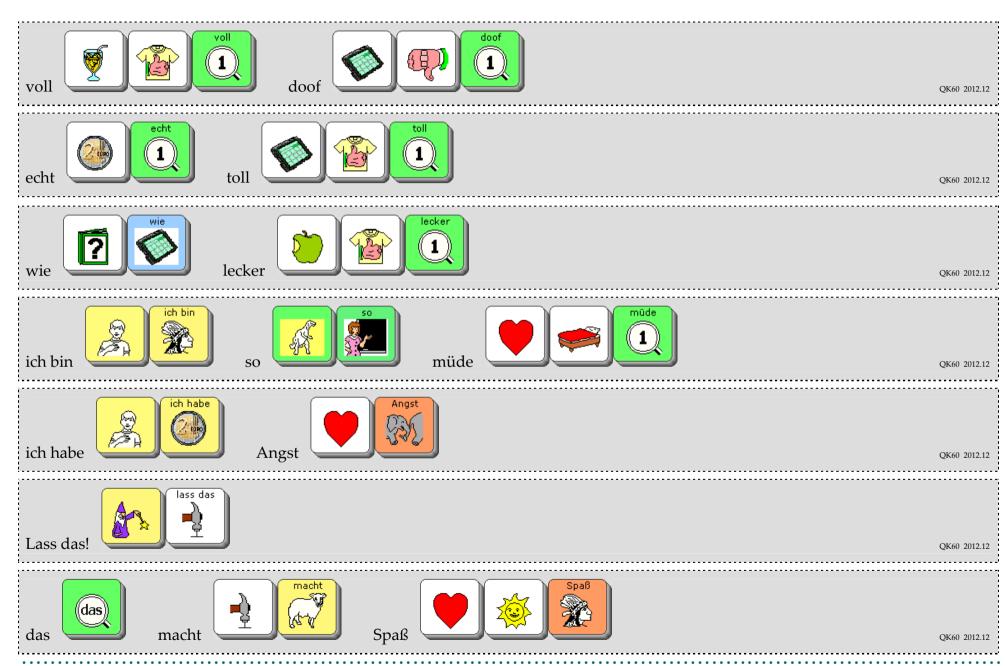


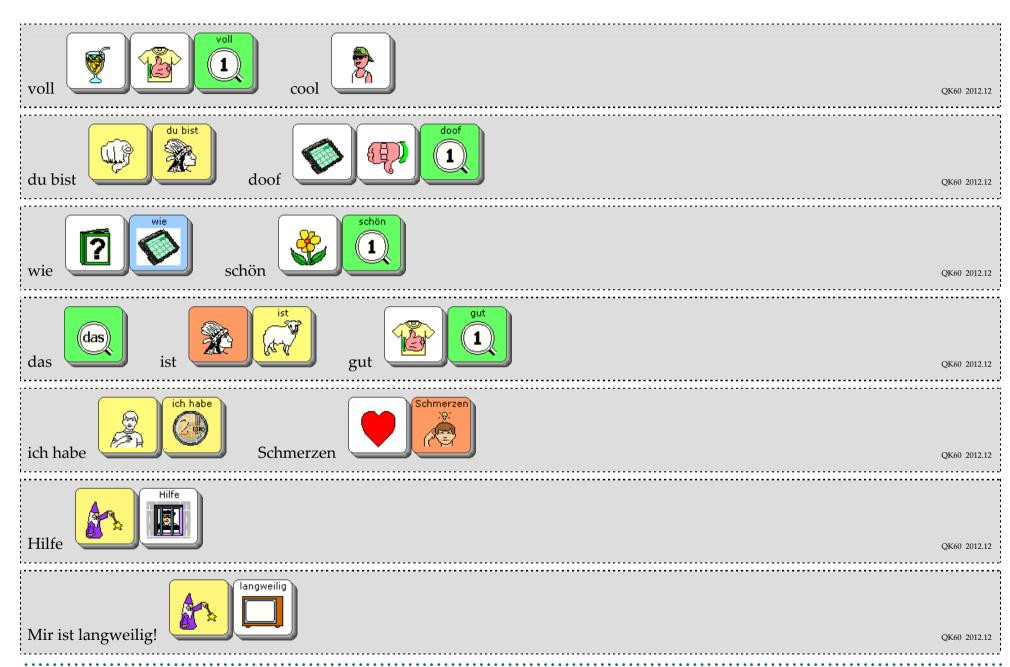

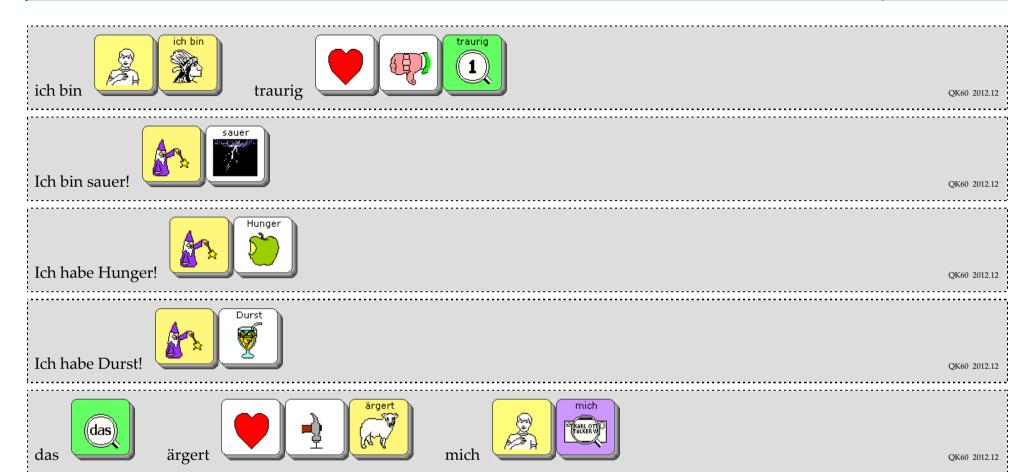

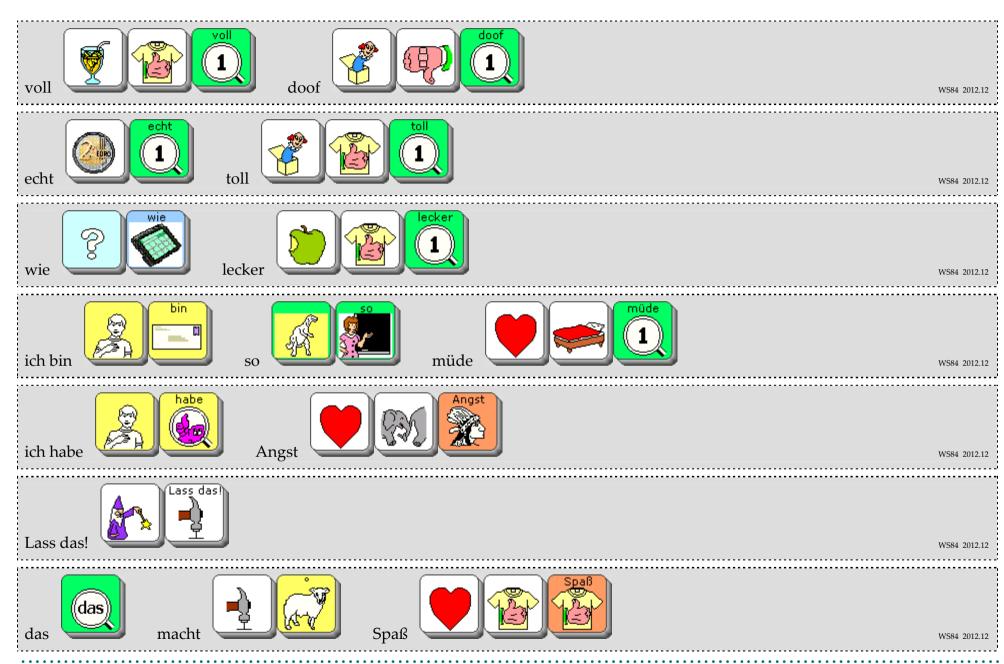

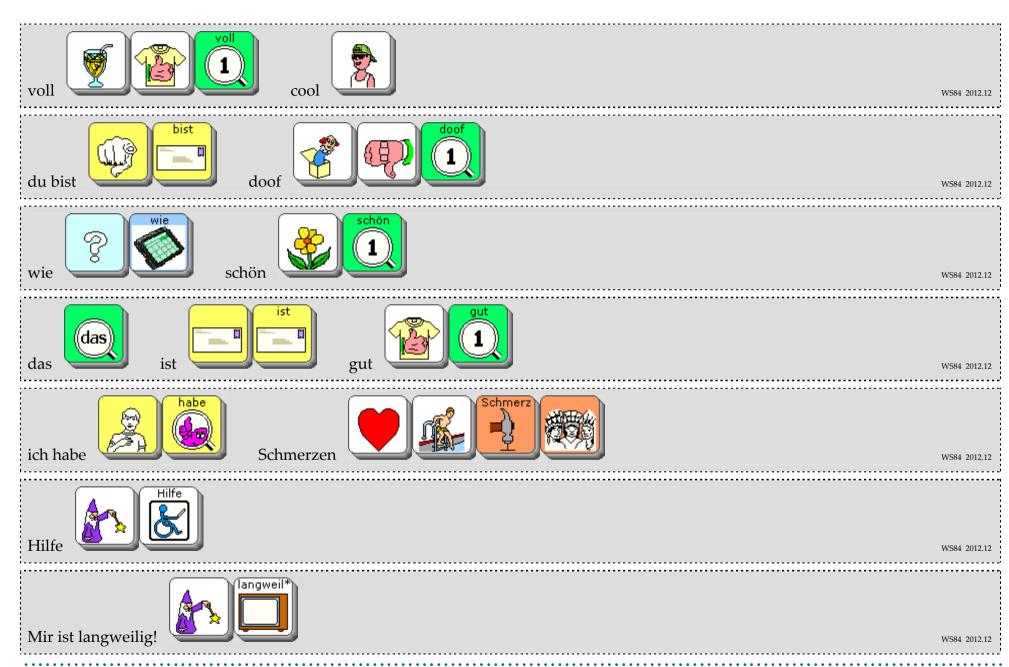

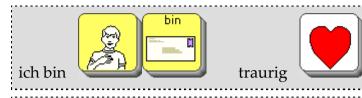

WS84 2012.12



Ich bin sauer!

WS84 2012.1



Ich habe Hunger!

WS84 2012.1



Ich habe Durst!

WS84 2012.1













WS84 2012.12



	ist	haben	Angst	Schmerzen
QK32	Modul 10	QK32 Modul	0 QK32 Modul 10	QK32 Schmerzen  Modul 10
	Ich habe Hunger!	Ich habe Durst!	traurig	froh
QK32	Hunger* Modul 10	QK32 Durst*  Modul	0 QK32 Modul 10	QK32 Modul 10
	gut	schlecht	langweilig	ärgern
QK32	Modul 10	QK32 Schlecht Modul	0 QK32 Modul 10	QK32 Andul 10
	freuen	lecker	eklig	
QK32	Modul 10	QK32 Modul	0 QK32 Modul 10	

