# PRD-WÖRTER DES MONATS

# mehr – genug

### **METACOM-SYMBOLE**







### **QUASSELKISTE 32**



### **QUASSELKISTE 45**

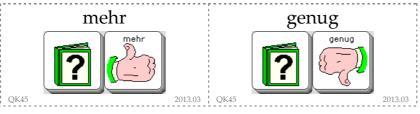

### **QUASSELKISTE 60**

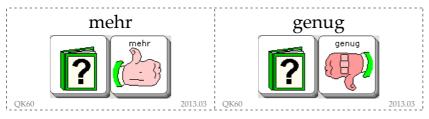

## **WORTSTRATEGIE 84**



### **METACHAT**



METACOM Symbole © Annette Kitzinger



# PRD-WÖRTER DES MONATS

# mehr – genug

### LUFTBALLON AUFPUSTEN

Lassen Sie den Benutzer beim gemeinsamen Luftballonspiel entscheiden, wie groß der Luftballon werden soll. Pusten Sie immer nur ein kleines bisschen "mehr", um viele Wiederholungen zu ermöglichen.

#### ROLLENSPIELE

Beim gemeinsamen Rollenspiel entscheidet der Benutzer beispielsweise, wie viel er im Kaufmannsladen einkaufen möchte oder wie viel Futter verschiedene Tiere bekommen sollen.

### GETRÄNK EINGIEßEN, BLUMEN GIEßEN

Der Benutzer entscheidet, wie viel er trinken möchte. Gießen Sie immer nur einen kleinen Schluck in das Glas, um viele Wiederholungen zu ermöglichen.

Versorgen Sie gemeinsam mit dem Benutzer die Pflanzen daheim und im Klassenzimmer. Der Benutzer schätzt ein, wie viel Wasser die Blumen brauchen.

### KOCHEN UND ZUBEREITEN

Wählen Sie Rezepte, bei denen keine genauen Mengenangaben eingehalten werden müssen. Lassen Sie den Benutzer beispielsweise beim gemeinsamen Zubereiten eines Obstsalates entscheiden, wie viel von jeder Zutat verwendet werden soll.

#### **MENGEN ABZÄHLEN**

Geben Sie dem Benutzer immer wieder im Alltag die Möglichkeit, die benötigte Anzahl von Gegenständen abzuzählen. Nutzen Sie hierbei Situationen wie das gemeinsame Tischdecken. Wie viele Teller werden benötigt? Wie viele Becher? Wie viele Gabeln?

### "DAS IST NICHT GENUG!" (PRD-IDEE NOVEMBER 2012)

Setzen Sie das Buch "Die kleine Raupe Nimmersatt" ein, um die Wörter "mehr" und "genug" zu vermitteln.

### "IN DER PIZZABÄCKEREI" (BEST OF PRD-IDEEN DES MONATS KAPITEL 2 TIPP 2)

In einer Bastelaktivität belegt der Benutzer eine Pizza nach seinen eigenen Vorstellungen. Lassen Sie den Benutzer entscheiden, wie viel er von den verschiedenen Zutaten verwenden möchte.

# "WANN LÄUFT ES ÜBER?" (BEST OF PRD-IDEEN DES MONATS KAPITEL 5 TIPP 1)

Bei diesem Experiment schätzt der Benutzer ein, wie viele Münzen in ein Wasserglas passen, bevor es überläuft. Passt noch "mehr" in das Glas? Oder ist schon "genug" drin?

# "BILD MALEN" (ENTDECKE DIE KRAFT DER SPRACHE MIT DEM MINSPEAK-ZIELVOKABULAR LB2 E)

Beim gemeinsamen Malen eines Bildes bestimmt der Benutzer, wie lange Sie mit einer Farbe malen.

# "INTERAKTIONSSTEUERNDE AUSSAGEN VERWENDEN" (ENTDECKE DIE KRAFT DER SPRACHE MIT DEM MINSPEAK-ZIELVOKABULAR LB4 H)

Geben Sie dem Benutzer die Möglichkeit, in möglichst vielen verschiedenen Alltagssituationen Einfluss auf den Verlauf einer Interaktion zu nehmen.



# PRD-IDEEN DES MONATS

## mehr – genug

# Turm bauen

Die gemeinsame Aktivität "Turm bauen" eignet sich gut, um die interaktionssteuernden Wörter "mehr" und "genug" spielerisch zu vermitteln.

#### DIESE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:

Bauklötze

### DIESE PRD-PRODUKTE KÖNNEN EINGESETZT WERDEN:

- 1 sprechende Taste (z.B. Step-by-Step)
- ➤ GoTalk9+, GoTalk20+ oder SuperTalker
- Minspeak-Anwendungsprogramme "Quasselkiste 32 / 45 / 60" oder "Wortstrategie 84"
- Anwendungsprogramm "MetaChat"

#### DAS GEHÖRT ZUR VORBEREITUNG:

- ➤ Beim Einsatz einer sprechenden Taste kennzeichnen Sie das Gerät mit dem Symbol und nehmen die entsprechenden Aussagen schrittweise auf.
- Zur Benutzung des GoTalks bzw. SuperTalkers verwenden Sie das beigefügte Deckblatt. Besprechen Sie das Gerät gemäß den Vorschlägen.
- ➤ Verwendet Ihr Talkerbenutzer ein Anwendungsprogramm, drucken Sie die Datei mit den Ikonensequenzen des entsprechenden Programms aus. Erstellen Sie daraus einzelne Satzstreifen.

### **JETZT KANN ES LOSGEHEN!**

- Modellieren Sie während des gemeinsamen Spiels verstärkt den Einsatz der Wörter "mehr" und "genug".
- ➤ Der Benutzer kann direkt in der Situation erleben, wie sich die verschiedenen Aussagen auf den Verlauf des Spiels auswirken. Eine bestimmte Reihenfolge der Äußerungen ist hierbei nicht erforderlich.

#### **SO KANN ES WEITERGEHEN:**

Vermitteln Sie den Einsatz der Wörter "mehr" und "genug" auch in anderen Spiel- und Alltagssituationen. Weitere Ideen finden Sie in dieser Datei auf Seite 2.

Die "PRD-Ideen des Monats" sind ein kostenloser Service der Prentke Romich GmbH.

Nutzung auf eigene Gefahr. Die Prentke Romich GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die aus der Befolgung der hier gemachten Angaben resultieren könnten.

Das Ein- bzw. Austragen in den Newsletter erfolgt unter www.prentke-romich.de.

#### Prentke Romich GmbH

Elektronische Kommunikationshilfen

Goethestr. 31 34119 Kassel


Tel. (0561) 78559-0 Fax (0561) 78559-29 E-Mail info@prentke-romich.de Web www.prentke-romich.de





## TASTENSYMBOL FÜR "PRD-IDEEN DES MONATS" MÄRZ 2013

### Tastensymbol für eine sprechende Taste

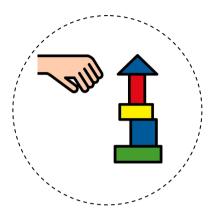

Ich habe eine Idee!
Lass uns einen Turm bauen!
Der muss hoch werden!
Mehr Steine!
Noch mehr Steine!
Genug! Jetzt schmeißen wir den Turm um!
Das macht Spaß!
Lass uns das noch mal machen!



## DECKBLATT FÜR "PRD-IDEEN DES MONATS" MÄRZ 2013

Feld 1: "mehr"

Feld 2: "Lass uns einen Turm bauen!"

Feld 3: -


Feld 4: "Und jetzt schmeißen wir den Turm um!"


Feld 5: "genug"

Feld 6: -

Feld 7: "Er soll höher werden!"

Feld 8: "Noch ein Stein!"

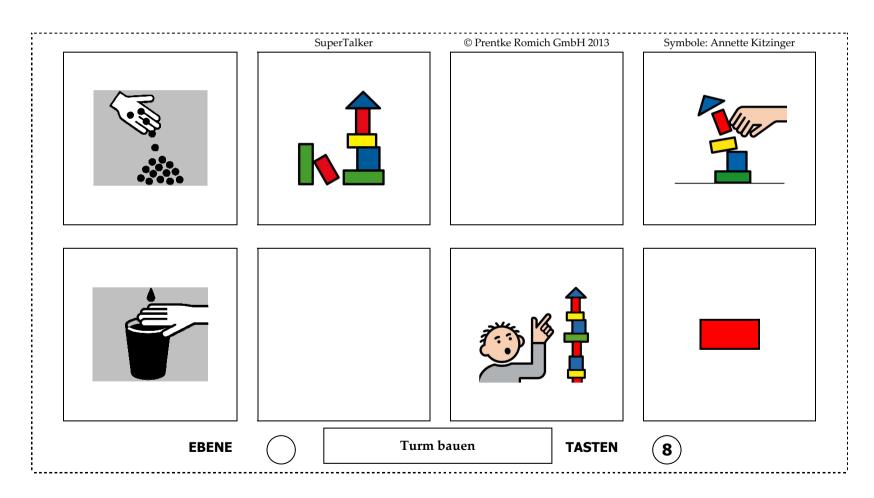

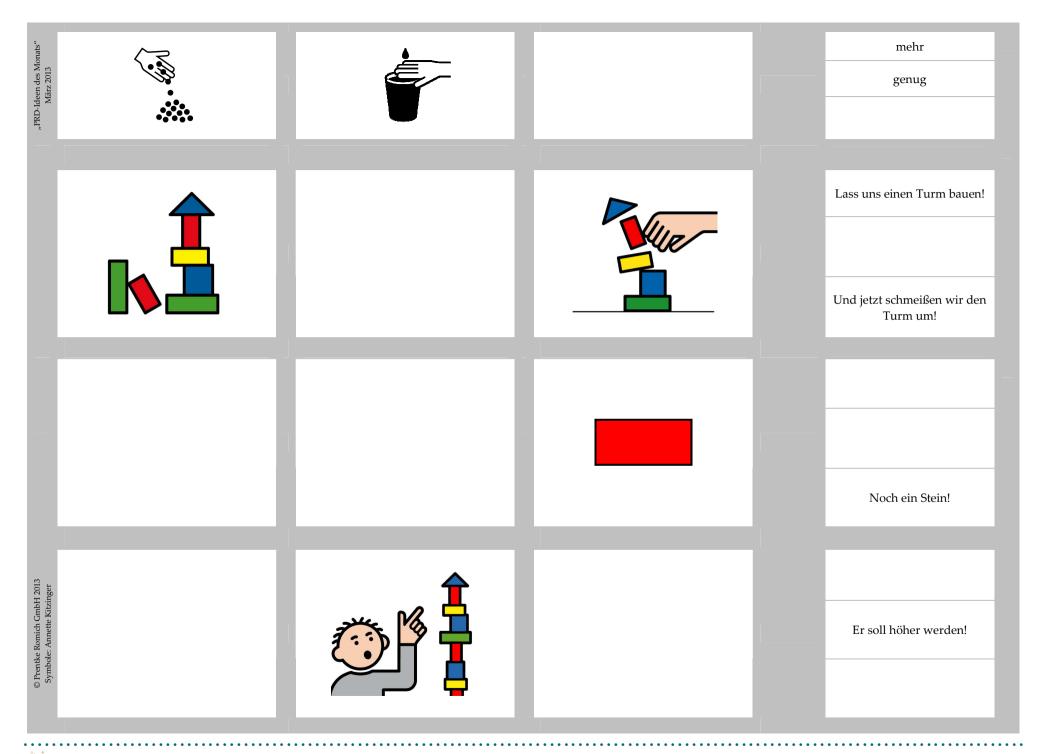

"PRD-Ideen des Monats" März 2013			mehr genug
			Lass uns einen Turm bauen!
		- Luc	Und jetzt schmeißen wir den Turm um!
			Noch ein Stein!
© Prentke Romich GmbH 2013 Symbole: Annette Kitzinger			Er soll höher werden!





QK32 2013.03



QK32 2013.03












QK32 2013.03



QK45 2013.03

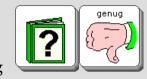

genug

QK45 2013.03







werfen



QK45 2013.03



QK60 2013.03



QK60 2013.03












QK60 2013.03



WS84 2013.03

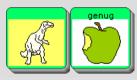

genug

WS84 2013.03














WS84 2013.03

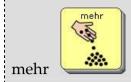

METACHAT 2013.03



genug

METACHAT 2013.03









werfen



METACHAT 2013.03

