



PRD-WÖRTER DES MONATS

weg - da


METACOM-SYMBOLE

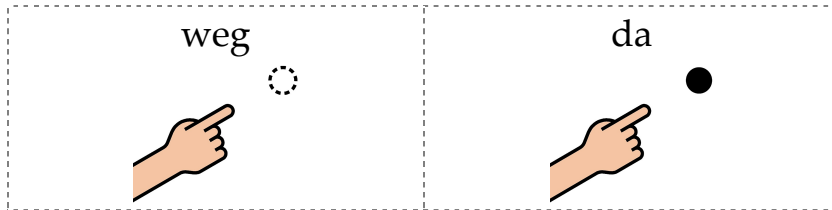


QUASSELKISTE 32

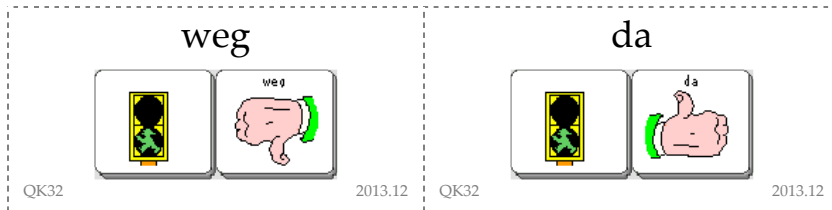


QUASSELKISTE 45 NEU

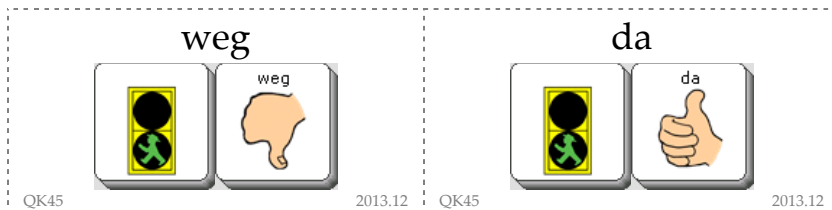


QUASSELKISTE 60 NEU

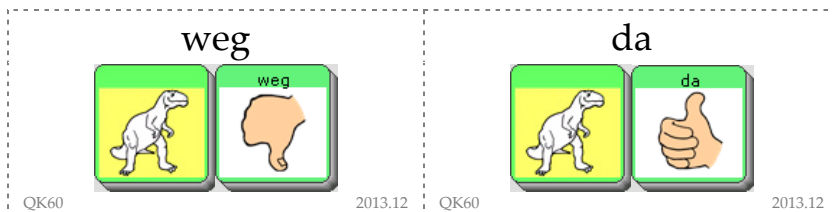

WORTSTRATEGIE 84 NEU

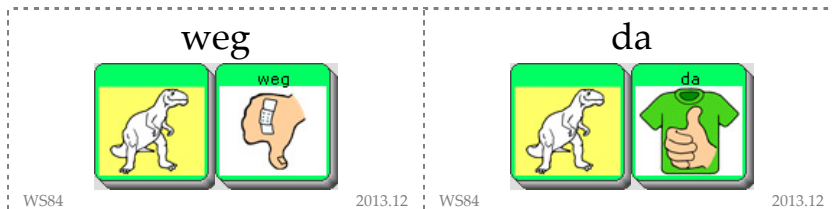

METACHAT

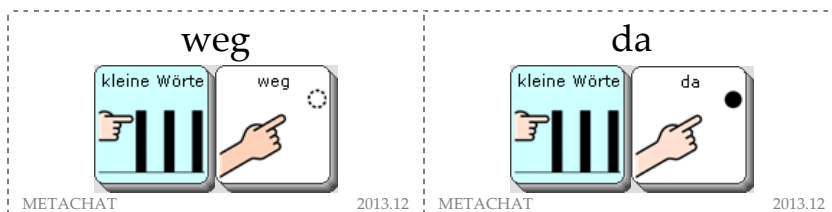

METACOM Symbole © Annette Kitzinger

PRD-WÖRTER DES MONATS

weg - da

„ELMAR SPIELT VERSTECKEN“

Lesen Sie gemeinsam mit Ihrem Benutzer das Buch „Elmar spielt verstecken“. Kommentieren Sie den Verlauf des Versteckspiels, z.B. „Vogel *weg*“ / „immer noch *weg*“ / „*da* ist Vogel“.

UNTER WELCHEM BECHER IST ES?

Nehmen Sie mehrere Becher und verstecken Sie unter einem der Becher einen Gegenstand (z.B. Gummibärchen, Salzbrezel). Verschieben Sie die Becher auf dem Tisch und lassen Sie die Mitspieler raten, wo der Gegenstand geblieben ist. Kommentieren Sie das Spiel, z.B. „es ist *weg*“ – „*da* ist es“.

GEGENSTÄNDE VERSTECKEN

Verstecken und suchen Sie einen Gegenstand im Klassenraum oder im Kinderzimmer, z.B. „Teddy ist *weg*“ – „*da* ist Teddy“.

ZAUBERTRICKS KOMMENTIEREN

Nutzen Sie die Wörter „*weg*“ und „*da*“, um Zaubertricks zu kommentieren.

„FLIEGT DAS WEG?“ (PRD-IDEE OKTOBER 2012)

Machen Sie ein Experiment: Holen Sie den Wind ins Haus und finden Sie heraus, was fliegt: Fliegt das *weg*? Oder bleibt das *da*?

„OSTEREISUCHE MIT ZIELVOKABULAR“ (PRD-IDEE MÄRZ 2009)

Verwenden Sie die Wörter „*weg*“ und „*da*“ während der gemeinsamen Ostereisuche.

„MEIN SCHLÜSSEL IST WEG!“ (BEST OF PRD-IDEEN DES MONATS KAPITEL 10 TIPP 1)

Die sprechenden Tasten von AbleNet wie BIGmack und Step-by-Step werden mit mehreren bunten Tastenkappen ausgeliefert, Nutzen Sie die Tastenkappen als Versteck: Mein Schlüssel ist *weg*!

PRD-IDEEN DES MONATS

weg - da

Weihnachtsbaum schmücken

Zum Weihnachtsfest werden wieder viele Weihnachtsbäume geschmückt werden. Lassen Sie Ihren UK-Benutzer seinen ganz persönlichen Papier-Tannenbaum schmücken.

DIESE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:

- Schere, Kleber
- ggf. Malstifte und Papier
- ggf. weitere Materialien zum Schmücken des Baumes

DIESE PRD-PRODUKTE KÖNNEN EINGESETZT WERDEN:

- 2 sprechende Tasten (z.B. BIGmacks oder Step-by-Steps)
- GoTalk9+, GoTalk20+ oder SuperTalker
- Minspeak-Anwendungsprogramme „Quasselkiste 32 / 45 / 60“ oder „Wortstrategie 84“
- Anwendungsprogramm „MetaChat“

DAS GEHÖRT ZUR VORBEREITUNG:

- Beim Einsatz sprechender Tasten kennzeichnen Sie die beiden Geräte mit den Symbolen und nehmen die entsprechenden Aussagen auf.
- Zur Benutzung des GoTalks bzw. SuperTalkers verwenden Sie das beigegefügte Deckblatt. Besprechen Sie das Gerät gemäß den Vorschlägen.
- Verwendet Ihr Talkerbenutzer ein Anwendungsprogramm, drucken Sie die Datei mit den Ikonensequenzen des entsprechenden Programms aus. Erstellen Sie einzelne Satzstreifen und Wortkarten.
- Drucken Sie den Weihnachtsbaum aus. Alternativ können Sie natürlich auch gemeinsam mit dem Benutzer einen Weihnachtsbaum malen.
- Schneiden Sie den Weihnachtsbaum-Schmuck aus. Halten Sie ggf. weitere Materialien zum Schmücken des Baumes bereit.

JETZT KANN ES LOSGEHEN!

- Gestalten Sie gemeinsam mit Ihrem UK-Benutzer seinen ganz persönlichen Weihnachtsbaum.
- Präsentieren Sie ihm immer wieder ein Material, mit dem der Baum geschmückt werden könnte. Lassen Sie den Benutzer entscheiden: „Das kann weg.“ oder „Das bleibt da.“ Lassen Sie ihn zusätzlich entscheiden, wo der Schmuck aufgeklebt werden soll („links“, „rechts“, „oben“, „unten“).

SO KANN ES WEITERGEHEN:

Vermitteln Sie den Einsatz der Wörter „weg“ und „da“ auch in anderen Spiel- und Alltagssituationen. Weitere Ideen finden Sie in dieser Datei auf Seite 2.

Die „PRD-Ideen des Monats“ sind ein kostenloser Service der Prentke Romich GmbH.

Nutzung auf eigene Gefahr. Die Prentke Romich GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die aus der Befolgung der hier gemachten Angaben resultieren könnten.

Das Ein- bzw. Austragen in den Newsletter erfolgt unter www.prentke-romich.de.

Prentke Romich GmbH

Elektronische Kommunikationshilfen

Goethestr. 31

34119 Kassel


Tel. (0561) 78559-0


Fax (0561) 78559-29

E-Mail info@prentke-romich.de


Web www.prentke-romich.de



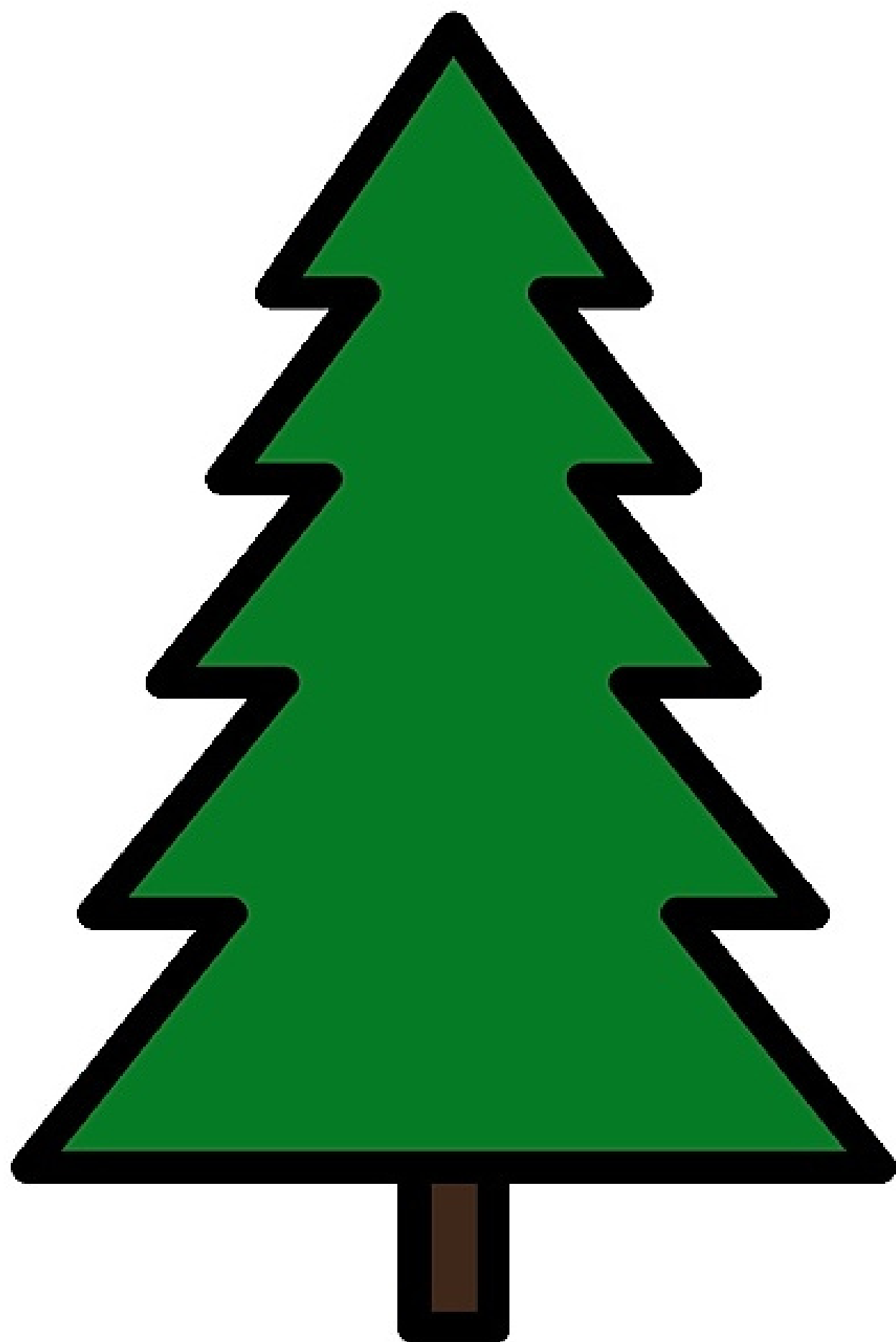

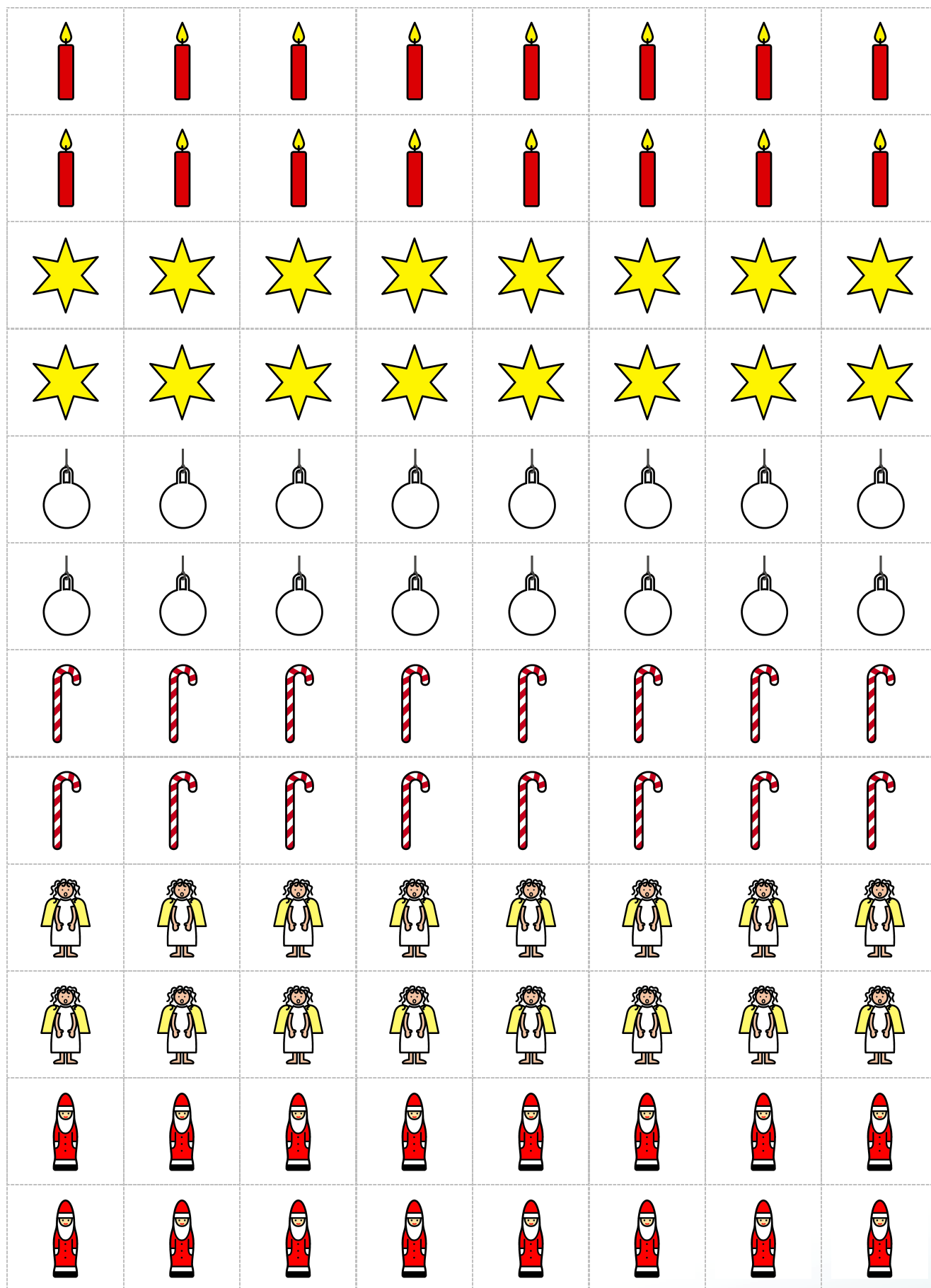


Tastensymbole für zwei sprechende Tasten

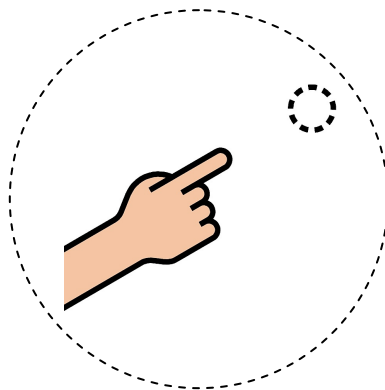



Das kann weg.



Das bleibt da.

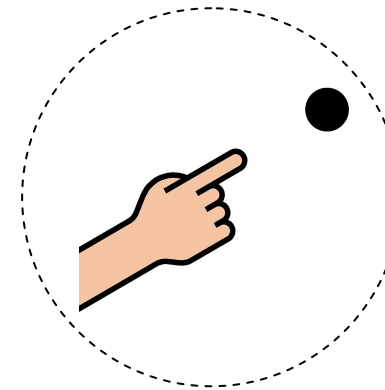

Feld 1: „Das kann weg.“

Feld 2: „Das bleibt da.“

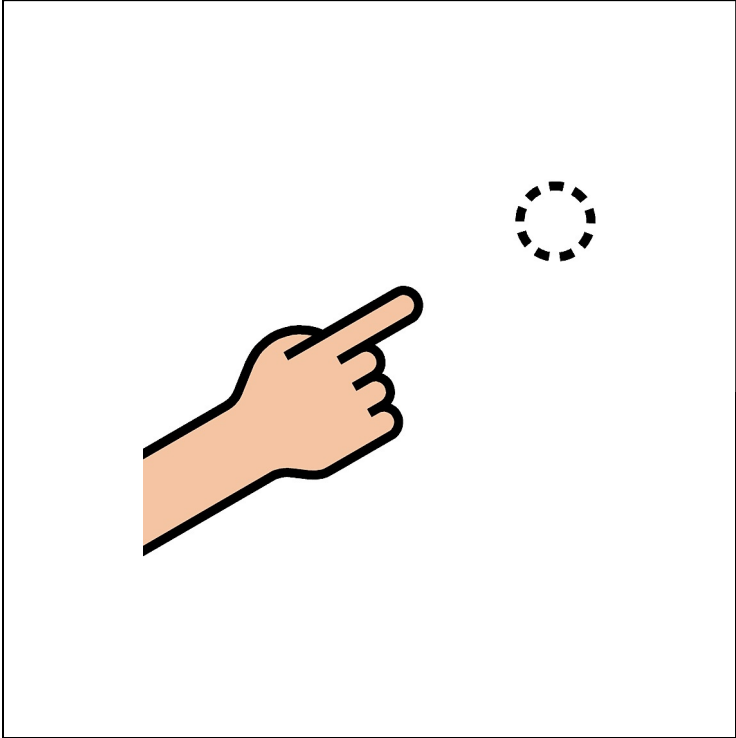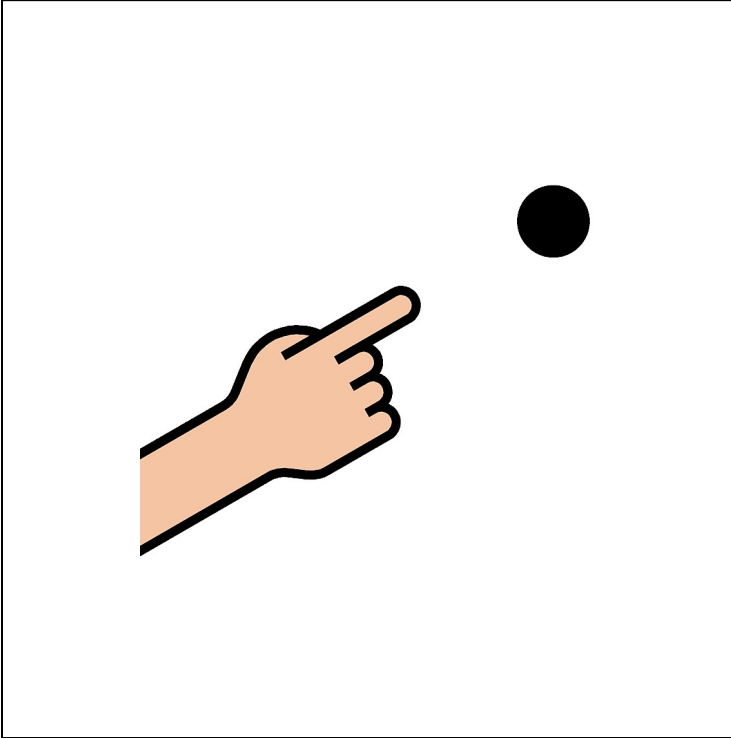SuperTalker		© Prentke Romich GmbH 2013	Symbole: Annette Kitzinger
			
EBENE 	Weihnachtsbaum schmücken	TASTEN 	

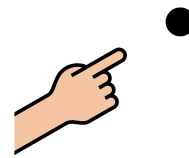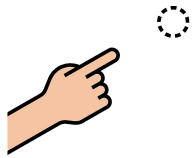


Das kann weg.


Das bleibt da.



oben

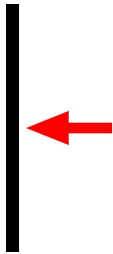



links

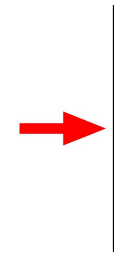

rechts



unten

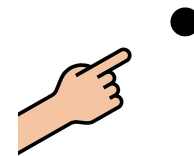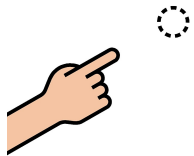

Das kann weg.

Das bleibt da.



oben



links



rechts



unten

können



weg



QK32 2013.12

bleiben



da



QK32 2013.12


links



QK32

2013.12

rechts

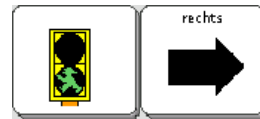

QK32

2013.12

oben



QK32

2013.12

unten



QK32

2013.12

das   kann  können  er sie es  weg   QK45 2013.12

das   bleibt  bleiben  er sie es  da   QK45 2013.12

links   QK45 2013.12	rechts   QK45 2013.12	oben   QK45 2013.12	unten   QK45 2013.12
--	--	---	--

das  kann   weg  

QK60 2013.12

das  bleibt    da  

QK60 2013.12

links	rechts	oben	unten
 	 	 	 
QK60 2013.12	QK60 2013.12	QK60 2013.12	QK60 2013.12

das  kann   weg  

WS84 2013.12

das  bleibt   da  

WS84 2013.12

links	rechts	oben	unten
 	 	 	 
WS84 2013.12	WS84 2013.12	WS84 2013.12	WS84 2013.12

das   kann     weg  

METACHAT 2013.12

das   bleibt      da  

METACHAT 2013.12

links	rechts	oben	unten
  	  	  	  
METACHAT 2013.12	METACHAT 2013.12	METACHAT 2013.12	METACHAT 2013.12