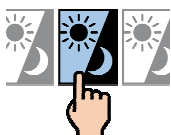
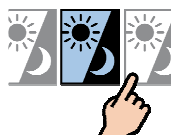


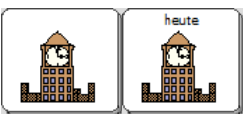
PRD-WÖRTER DES MONATS

gestern – heute – morgen

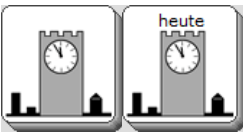
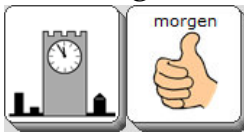
METACOM-SYMBOLLE

gestern 	heute 	morgen 
--	--	---

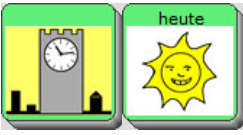
QUASSELKISTE 32

gestern  QK32 2014.09	heute  QK32 2014.09	morgen  QK32 2014.09
--	--	---

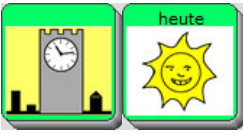
QUASSELKISTE 45 NEU

gestern  QK45 2014.09	heute  QK45 2014.09	morgen  QK45 2014.09
--	--	---

QUASSELKISTE 60 NEU

gestern  QK60 2014.09	heute  QK60 2014.09	morgen  QK60 2014.09
--	--	---

WORTSTRATEGIE 84 NEU

gestern  WS84 2014.09	heute  WS84 2014.09	morgen  WS84 2014.09
--	--	---

METACHAT

gestern  METACHAT 2014.09	heute  METACHAT 2014.09	morgen  METACHAT 2014.09
--	--	---

PRD-WÖRTER DES MONATS

gestern – heute – morgen

WOCHENENDPLANUNG

Besprechen Sie gemeinsam Ihre Unternehmungen am Wochenende. Was machen wir „heute“? Was machen wir „morgen“?

ÄMTER ÜBERNEHMEN

Die Morgenkreissituation bietet die Gelegenheit, Ämter und Aufgaben wie das Wegbringen der Essensliste, Tischdecken, Blumengießen, Tafelwischen etc. festzulegen. Wer war „gestern“? Wer darf „heute“? Vielleicht gibt es sogar schon Planungen für „morgen“.

„MORGENKREIS“ (PRD-IDEE OKTOBER 2013)

Es wird der aktuelle, heutige Tag besprochen und der Nutzer lernt Fragen zu stellen. Wer ist „heute“ da? Wer ist „heute“ nicht da? Wie ist das Wetter „heute“? Was machen wir „heute“? Was essen wir „heute“? etc.

„GESCHICHTEN ERFINDEN“ (BEST OF PRD-IDEEN DES MONATS KAPITEL 7 TIPP 1)

In der Geschichte II beeinflusst der UK-Benutzer durch den Einsatz des Wortes „gestern“ den Verlauf der erfundenen Geschichte.

„PAUSEN-WETTER“ (BEST OF PRD-IDEEN DES MONATS KAPITEL 8 TIPP 4)

Das Wetter bietet immer wieder einen guten Gesprächsanlass! Wie ist das Wetter „heute“? Welchen Einfluss hat das Wetter auf die Pause? Bleiben wir „heute“ drinnen oder gehen wir „heute“ raus? Was für Kleidung ziehen wir „heute“ an?

„ANSAGEN MACHEN“ (ENTDECKE DIE KRAFT DER SPRACHE MIT DEM MINSPEAK-ZIELVOKABULAR LB4 E)

Bei den Ansagen für die Situationen Mittagessen und Einkaufen können die Zielwörter „heute“ und „morgen“ eingesetzt werden.

„ROLLENSPIEL ARZT – PATIENT“ (ENTDECKE DIE KRAFT DER SPRACHE MIT DEM MINSPEAK-ZIELVOKABULAR LB4 FF)

Im Rollenspiel berichtet der Patient vertrauensvoll dem Arzt: „Ich fühle mich seit „gestern“ krank“ und „heute“ Nacht habe ich mich übergeben.“. Mit ein bisschen Phantasie können die Zielwörter noch viel häufiger in das Gespräch eingebaut werden.

„ERLEBNIS BERICHTEN“ (ENTDECKE DIE KRAFT DER SPRACHE MIT EINFACHEN SPRACHAUSGABEBEGERÄTEN LB3 B)

Lassen Sie Ihren UK-Benutzer vielen unterschiedlichen Personen erzählen, was er „gestern“ oder „heute“ erlebt hat. Der Bericht eignet sich nicht nur für den Morgenkreis, sondern auch für ein Gespräch mit Freunden, Nachbarn oder Geschwistern.

PRD-IDEEN DES MONATS

gestern – heute – morgen

Wochentagsschau

Der Morgenkreis bietet eine gute wiederkehrende Möglichkeit, neue Wörter zu vermitteln. Ihr UK-Benutzer kann sich mit Hilfe unserer aktuellen Idee aktiv beim Besprechen der Wochentage einbringen.

DIESE PRD-PRODUKTE KÖNNEN EINGESETZT WERDEN:

- 1 sprechende Taste (z.B. Step-by-Step)
- GoTalk9+, GoTalk20+ oder SuperTalker
- Minspeak-Anwendungsprogramme „Quasselkiste 32 / 45 / 60“ oder „Wortstrategie 84“
- Anwendungsprogramm „MetaChat“

DAS GEHÖRT ZUR VORBEREITUNG:

- Beim Einsatz einer sprechenden Taste kennzeichnen Sie das Gerät mit dem Symbol und nehmen die entsprechenden Aussagen schrittweise auf.
- Zur Benutzung des GoTalks bzw. SuperTalkers verwenden Sie das beigegefügte Deckblatt. Besprechen Sie das Gerät gemäß den Vorschlägen.
- Die Aufnahmen auf den Geräten können mit oder ohne die aktuellen Wochentage erfolgen.
- Verwendet Ihr Talkerbenutzer ein Anwendungsprogramm, drucken Sie die Datei mit den Ikonensequenzen des entsprechenden Programms aus. Erstellen Sie einzelne Wortkarten.

JETZT KANN ES LOSGEHEN!

- Verteilen Sie die Bildkarten mit den Wochentagen an die anwesenden Personen oder legen Sie die Bildkarten gut sichtbar in die Mitte des Morgenkreises.
- Mit Hilfe des jeweiligen Hilfsmittels sagt der UK-Benutzer die Äußerungen „gestern war...“, „heute ist...“ und „morgen ist...“. Kann er dabei schon eine bestimmte Reihenfolge einhalten?
- Sind die Wochentage nicht aufgenommen worden, kann der zur Äußerung passende Wochentag durch eine andere Person ergänzt werden.
- Wer hat die dazu gehörige Bildkarte oder wer kann diese finden?

SO KANN ES WEITERGEHEN:

Vermitteln Sie den Einsatz der Wörter „gestern“, „heute“ und „morgen“ auch in anderen Spiel- und Alltagssituationen. Weitere Ideen finden Sie in dieser Datei auf Seite 2.

Die „PRD-Ideen des Monats“ sind ein kostenloser Service der Prentke Romich GmbH.

Nutzung auf eigene Gefahr. Die Prentke Romich GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die aus der Befolgung der hier gemachten Angaben resultieren könnten.

Das Ein- bzw. Austragen in den Newsletter erfolgt unter www.prentke-romich.de.

Prentke Romich GmbH

Elektronische Kommunikationshilfen

Goethestr. 31

34119 Kassel

Tel. (0561) 78559-0

Fax (0561) 78559-29

E-Mail info@prentke-romich.de

Web www.prentke-romich.de



Montag

Mo

Dienstag

Di

Mittwoch

Mi

Donnerstag

Do

Freitag

Fr

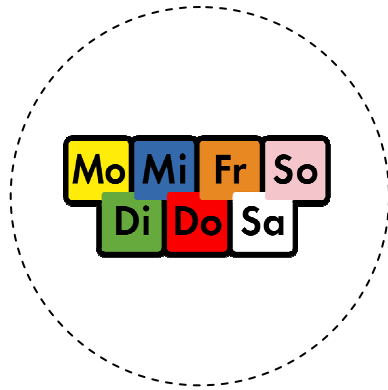
Samstag

Sa

Sonntag

So

Tastensymbol für eine sprechende Taste



Gestern war ...*(ggf. Tag ergänzen)*
Heute ist ...*(ggf. Tag ergänzen)*
Morgen ist ...*(ggf. Tag ergänzen)*

Feld 1: „Hallo!“

Feld 2: -

Feld 3: -

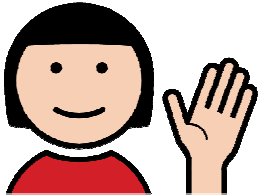
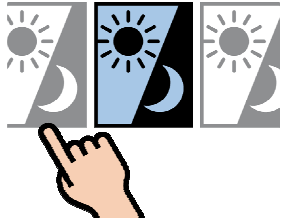
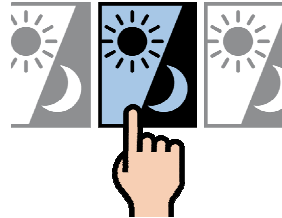
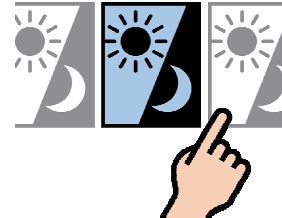
Feld 4: -

Feld 5: -

Feld 6: „Gestern war...(ggf. Tag ergänzen)“

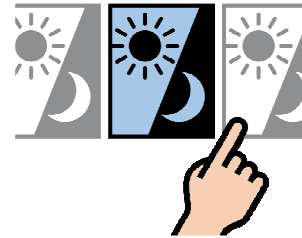
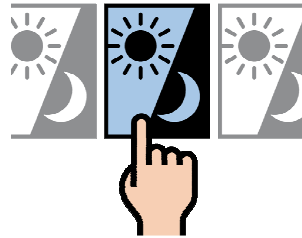
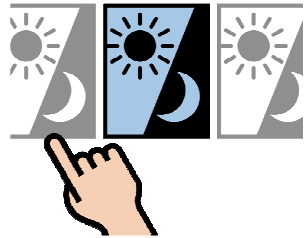
Feld 7: „Heute ist ...(ggf. Tag ergänzen)“

Feld 8: „Morgen ist ...(ggf. Tag ergänzen)“

SuperTalker		© Prentke Romich GmbH 2014		Symbole: Annette Kitzinger	
					
					
EBENE		Wochentagsschau	TASTEN		



Hallo!



Gestern war ...
(ggf. Tag ergänzen)

Heute ist...
(ggf. Tag ergänzen)

Morgen ist...
(ggf. Tag ergänzen)



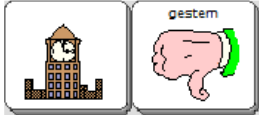
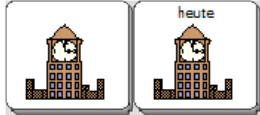
Hallo!

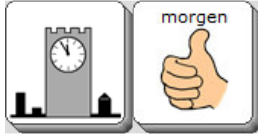
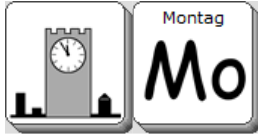
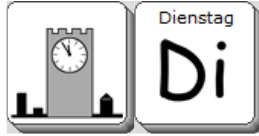
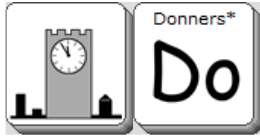


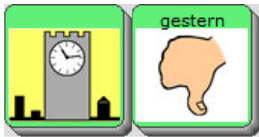
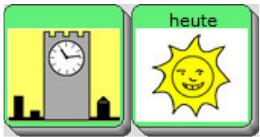
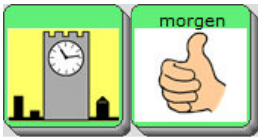
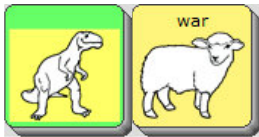
Gestern war ...*(ggf. Tag ergänzen)*

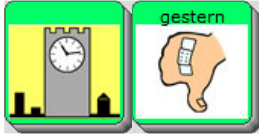
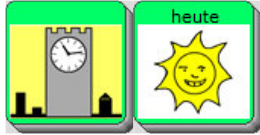
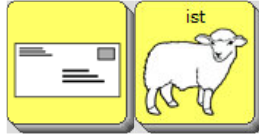
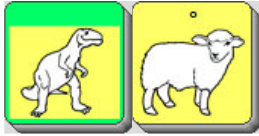
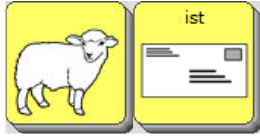
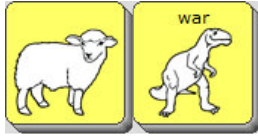
Heute ist ...*(ggf. Tag ergänzen)*

Morgen ist ...*(ggf. Tag ergänzen)*

gestern  QK32 2014.09	heute  QK32 2014.09	morgen  QK32 2014.09	ist  QK32 2014.09
Montag  QK32 2014.09	Dienstag  QK32 2014.09	Mittwoch  QK32 2014.09	Donnerstag  QK32 2014.09
Freitag  QK32 2014.09	Samstag  QK32 2014.09	Sonntag  QK32 2014.09	

gestern  QK45 2014.09	heute  QK45 2014.09	morgen  QK45 2014.09	ist  QK45 2014.09
gewesen  QK45 2014.09	es ist  QK45 2014.09	Montag  QK45 2014.09	Dienstag  QK45 2014.09
Mittwoch  QK45 2014.09	Donnerstag  QK45 2014.09	Freitag  QK45 2014.09	Samstag  QK45 2014.09
Sonntag  QK45 2014.09			

gestern  QK60 2014.09	heute  QK60 2014.09	morgen  QK60 2014.09	ist  QK60 2014.09
war  QK60 2014.09	es ist  QK60 2014.09	es war  QK60 2014.09	Montag  QK60 2014.09
Dienstag  QK60 2014.09	Mittwoch  QK60 2014.09	Donnerstag  QK60 2014.09	Freitag  QK60 2014.09
Samstag  QK60 2014.09	Sonntag  QK60 2014.09		

gestern  WS84 2014.09	heute  WS84 2014.09	morgen  WS84 2014.09	ist  WS84 2014.09
war  WS84 2014.09	es ist  WS84 2014.09	es war  WS84 2014.09	Montag  WS84 2014.09
Dienstag  WS84 2014.09	Mittwoch  WS84 2014.09	Donnerstag  WS84 2014.09	Freitag  WS84 2014.09
Samstag  WS84 2014.09	Sonntag  WS84 2014.09		

gestern



METACHAT

2014.09

heute



METACHAT

2014.09

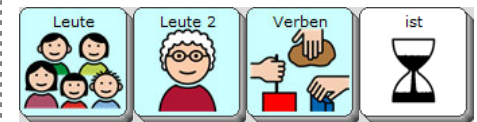
morgen



METACHAT

2014.09

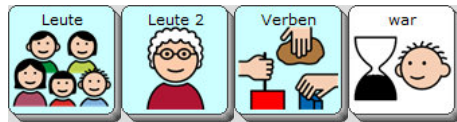
ist



METACHAT

2014.09

war



METACHAT

2014.09

es ist



METACHAT

2014.09

es war



METACHAT

2014.09

Montag



METACHAT

2014.09

Dienstag



METACHAT

2014.09

Mittwoch



METACHAT

2014.09

Donnerstag



METACHAT

2014.09

Freitag



METACHAT

2014.09

Samstag



METACHAT

2014.09

Sonntag



METACHAT

2014.09