



# PRD-WÖRTER DES MONATS

## mit – ohne


### METACOM-SYMBOLE

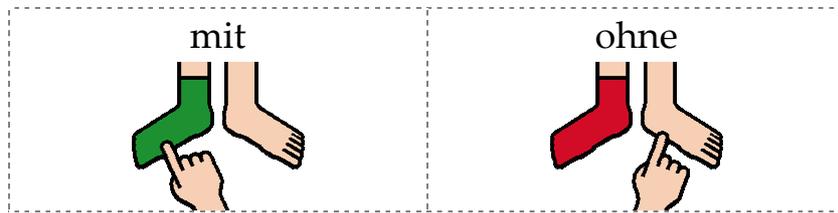

### QUASSELKISTE 32

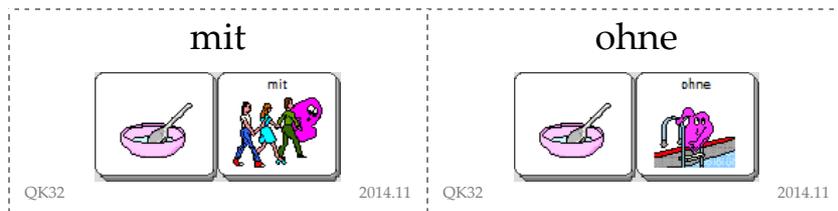


### QUASSELKISTE 45 NEU

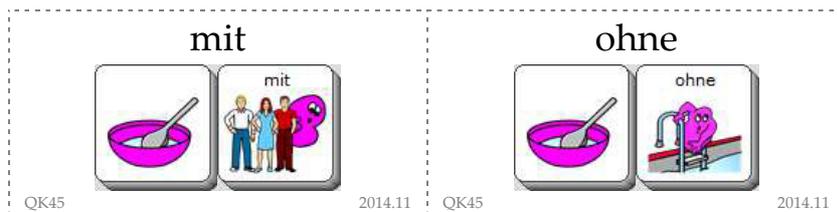


### QUASSELKISTE 60 NEU



### WORTSTRATEGIE 84 NEU

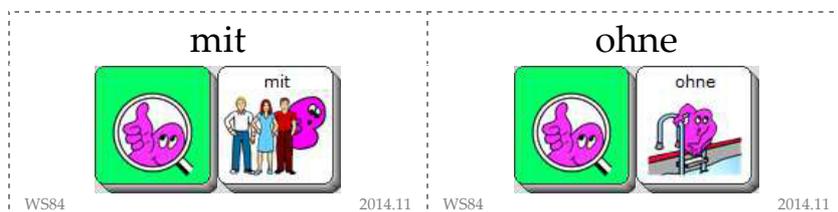

### METACHAT

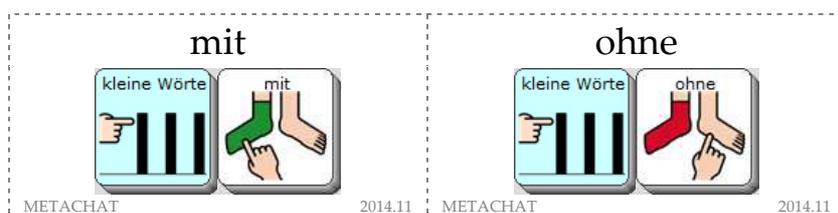

# PRD-WÖRTER DES MONATS

## mit – ohne

### ALLTAGSHANDLUNGEN KOMMENTIEREN

Machen Sie dem Benutzer im Tagesablauf immer wieder die Zielwörter *mit* und *ohne* bewusst und kommentieren Sie entsprechende Handlungen und Situationen (z.B.: Willst du *mit*machen? Komm *mit*, *mit* Freude, *ohne* dich, Kaffee *mit* / *ohne* Milch).

### MALEN

Malen Sie gemeinsam mit Ihrem Benutzer ein Bild. Entscheiden Sie, wie die Personen, Tiere und Gegenstände aussehen sollen: eine Person *mit* oder *ohne* Brille, *mit* oder *ohne* Mütze, *mit* oder *ohne* Sommersprossen, ein Hund *mit* oder *ohne* Leine, ein Haus *mit* oder *ohne* Schornstein?

### ZEITSCHRIFTEN BETRACHTEN

Wie sehen Menschen in Zeitschriften aus? Ist das eine Frau *mit* Schal oder *ohne*? Ist das ein Mann *mit* Haaren oder *ohne*?

### „GESCHICHTEN ERFINDEN“ (BEST OF PRD-IDEEN DES MONATS KAPITEL 7 TIPP 1)

In der Geschichte I kann der Benutzer durch die Vorgabe des Wortes *ohne* und in der Geschichte III durch das Wort *mit* den Verlauf der zu erfindenden Geschichten beeinflussen.

### „PAUSEN-WETTER“ (BEST OF PRD-IDEEN DES MONATS KAPITEL 8 TIPP 4)

Wie ist das Wetter und wie wirkt es sich auf unsere Kleidung in der Pause aus? Gehen wir *mit* oder *ohne* Handschuhe und *mit* oder *ohne* Jacke nach draußen?

### „FERIENINTERVIEW ZU SCHULBEGINN“ (BEST OF PRD-IDEEN DES MONATS KAPITEL 9 TIPP 3)

Nach den Ferien bzw. dem Urlaub gibt es in den Schulen und Einrichtungen viel zu erzählen und zu fragen. Wo warst du? Was hast du gemacht? Wie hat es dir gefallen und wer war *mit*?

### „ANSAGEN MACHEN“ (ENTDECKE DIE KRAFT DER SPRACHE MIT DEM MINSPEAK-ZIELVOKABULAR LB4 E)

Beim Ansagen des Mittagessens und bei der Planung des Einkaufs kann das Zielwort *mit* eingesetzt werden.

### „INTERAKTIONSSTEUERENDE AUSSAGEN VERWENDEN“ (ENTDECKE DIE KRAFT DER SPRACHE MIT DEM MINSPEAK-ZIELVOKABULAR LB4 H)

Das Wort *mit* eignet sich gut, um Einfluss auf Geschehnisse im Alltag nehmen zu können. In dieser Idee werden zahlreiche Wörter vorgestellt, die gut die Wirksamkeit von Sprache erleben lassen.

### „ASSOZIATIONEN SAMMELN ZU EINEM BILD“ (ENTDECKE DIE KRAFT DER SPRACHE MIT DEM MINSPEAK-ZIELVOKABULAR LB4 J)

In dieser Idee steht das Förderprinzip „Beschreiben statt Benennen“ im Vordergrund. So können auch die Zielwörter wiederholt eingesetzt werden: der Kuchen wird *mit* der Gabel gegessen, die Kekse werden *ohne* Gabel gegessen, ein Kuchen *mit* Kerzen, ein Glas *mit* Orangensaft, ein Teller *mit* Schokoküssen.

# PRD-IDEEN DES MONATS

*mit – ohne*

## Wunschmenü

Bei dieser Aktivität können die Teilnehmer schlemmen, ohne dick zu werden! Was mag Ihr Benutzer besonders gerne? Bevorzugt er das Eis *mit* oder *ohne* Sahne? Schmeckt die Pizza besser *mit* oder *ohne* Pilze?

### DIESE PRD-PRODUKTE KÖNNEN EINGESETZT WERDEN:

- 2 sprechende Tasten (z.B. BIGmacks oder Step-by-Steps)
- GoTalk9+, GoTalk20+ oder SuperTalker
- Minspeak-Anwendungsprogramme „Quasselkiste 32 / 45 / 60“ oder „Wortstrategie 84“
- Anwendungsprogramm „MetaChat“

### DAS GEHÖRT ZUR VORBEREITUNG:

- Beim Einsatz sprechender Tasten kennzeichnen Sie die Geräte mit den Symbolen und nehmen die entsprechenden Aussagen auf.
- Zur Benutzung des GoTalks bzw. SuperTalkers verwenden Sie das beigegefügte Deckblatt. Besprechen Sie das Gerät gemäß den Vorschlägen.
- Verwendet Ihr Talkerbenutzer ein Anwendungsprogramm, drucken Sie die Datei mit den Ikonensequenzen des entsprechenden Programms aus. Erstellen Sie einzelne Wortkarten.
- Drucken Sie die Bildkarten aus und schneiden Sie diese paarweise aus.

### JETZT KANN ES LOSGEHEN!

- Betrachten Sie zu zweit oder in einer kleinen Gruppe die Bildkarten.
- Die Benutzer dürfen sich ein mehrgängiges Wunschmenü zusammenstellen (zum Beispiel: erst Suppe *mit* Reis, dann eine Pizza *ohne* Pilze, dann Eis *mit* Sahne). Wie viel Sahne soll es denn sein? Viel oder wenig? Finden das die anderen auch lecker oder eklig?

### SO KANN ES WEITERGEHEN:

Vermitteln Sie den Einsatz der Wörter „mit“ und „ohne“ auch in anderen Spiel- und Alltagssituationen. Weitere Ideen finden Sie in dieser Datei auf Seite 2.

Die „PRD-Ideen des Monats“ sind ein kostenloser Service der Prentke Romich GmbH.

Nutzung auf eigene Gefahr. Die Prentke Romich GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die aus der Befolgung der hier gemachten Angaben resultieren könnten.

Das Ein- bzw. Austragen in den Newsletter erfolgt unter [www.prentke-romich.de](http://www.prentke-romich.de).

#### Prentke Romich GmbH

Elektronische Kommunikationshilfen

Goethestr. 31

34119 Kassel












Tel. (0561) 78559-0













Fax (0561) 78559-29


E-Mail [info@prentke-romich.de](mailto:info@prentke-romich.de)

Web [www.prentke-romich.de](http://www.prentke-romich.de)

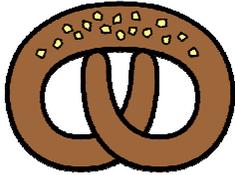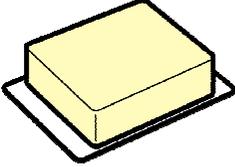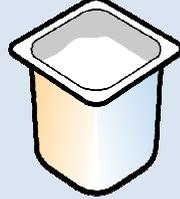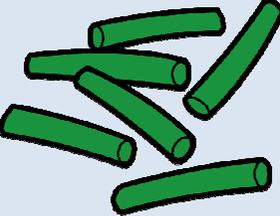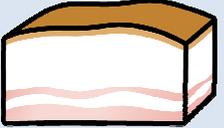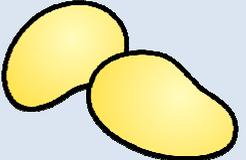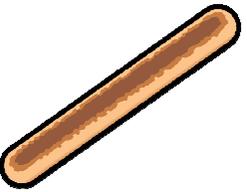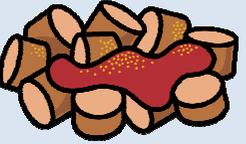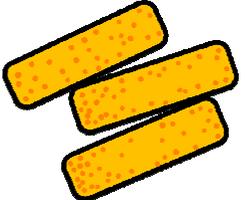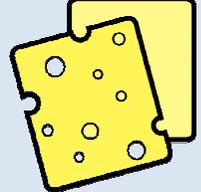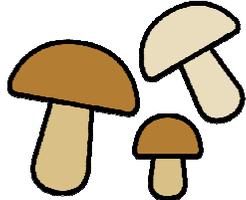


<p>Eis</p> 	<p>Sahne</p> 	<p>Brezel</p> 	<p>Butter</p> 	<p>Joghurt</p> 	<p>Marmelade</p> 
<p>Ei</p> 	<p>Salz</p> 	<p>Bohnen</p> 	<p>Speck</p> 	<p>Pommes</p> 	<p>Ketchup</p> 
<p>Kartoffeln</p> 	<p>Soße</p> 	<p>Bratwurst</p> 	<p>Senf</p> 	<p>Currywurst</p> 	<p>Pommes</p> 
<p>Fischstäbchen</p> 	<p>Mayonnaise</p> 	<p>Hamburger</p> 	<p>Käse</p> 	<p>Pizza</p> 	<p>Pilze</p> 
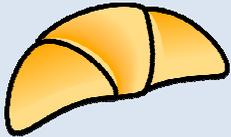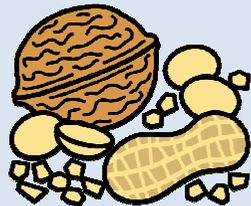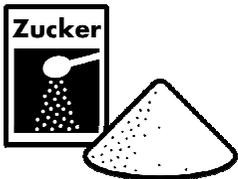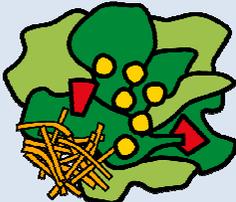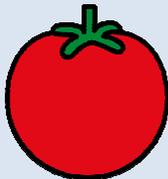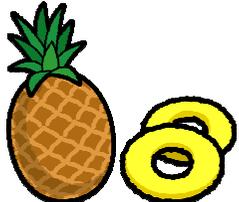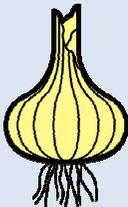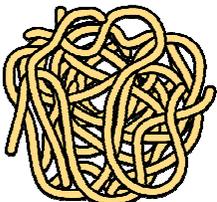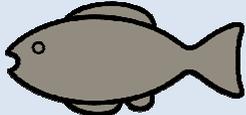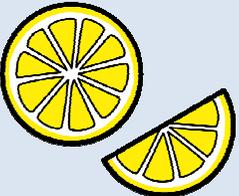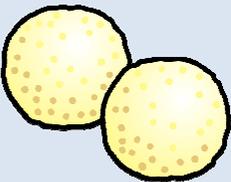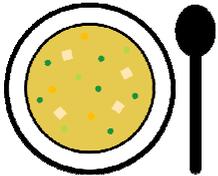
<p>Croissant</p> 	<p>Honig</p> 	<p>Brötchen</p> 	<p>Schokocreme</p> 	<p>Müsli</p> 	<p>Nüsse</p> 
<p>Popcorn</p> 	<p>Zucker</p> 	<p>Salat</p> 	<p>Tomate</p> 	<p>Obstsalat</p> 	<p>Ananas</p> 
<p>Bratkartoffeln</p> 	<p>Zwiebel</p> 	<p>Spaghetti</p> 	<p>Soße</p> 	<p>Fisch</p> 	<p>Zitrone</p> 
<p>Hähnchen</p> 	<p>Gemüse</p> 	<p>Klöße</p> 	<p>Soße</p> 	<p>Suppe</p> 	<p>Reis</p> 

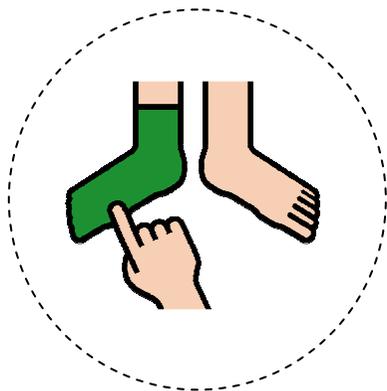

mit

ohne

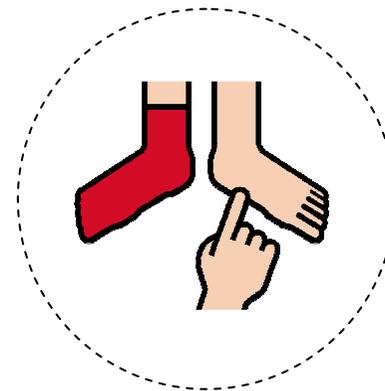

Feld 1: „mit“

Feld 2: „ohne“

SuperTalker © Prentke Romich GmbH 2014 Symbole: Annette Kitzinger

EBENE  Wunschmenü TASTEN

Feld 1: „ich möchte“

Feld 2: -

Feld 3: „mit“






Feld 4: „ohne“


Feld 5: „viel“

Feld 6: „wenig“

Feld 7: -


Feld 8: -

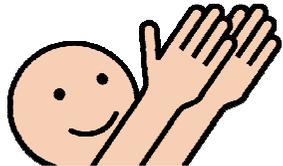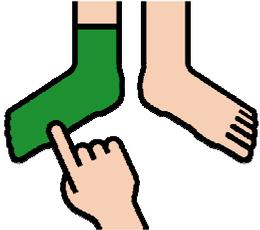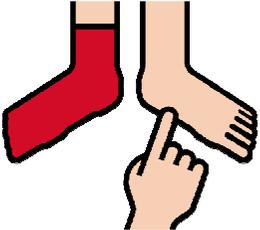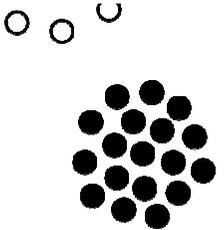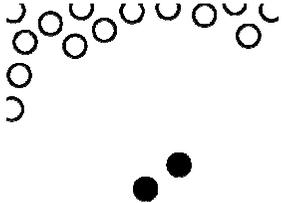	<p>SuperTalker</p>	<p>© Prentke Romich GmbH 2014</p> 	<p>Symbole: Annette Kitzingner</p> 	
				
<p><b>EBENE</b></p>		<p><b>Wunschmenü</b></p>	<p><b>TASTEN</b></p>	<p><b>8</b></p>

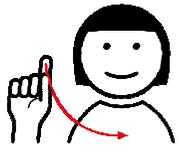


noch mal


fertig

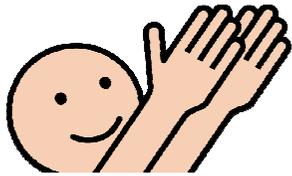


ich möchte

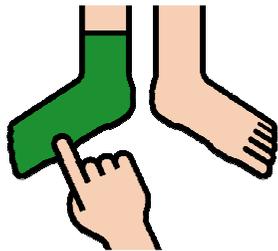


mit

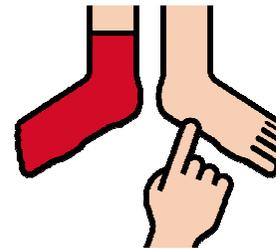



ohne

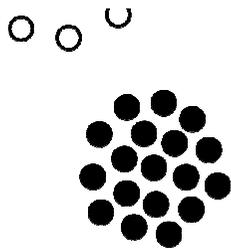

viel





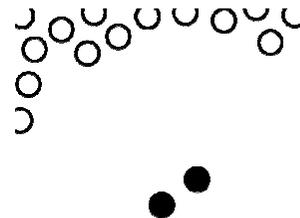


wenig




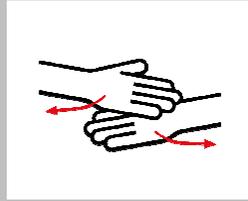
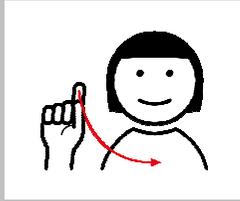


noch mal

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fertig








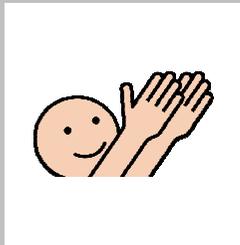


ich möchte

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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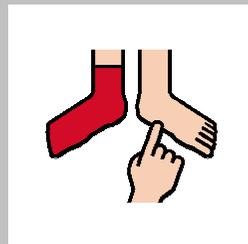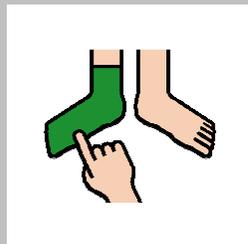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



mit

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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ohne

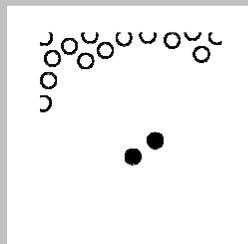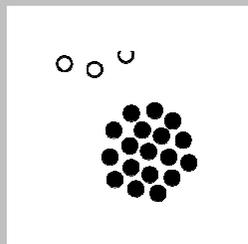


viel

wenig
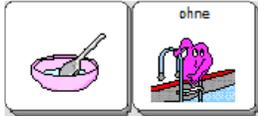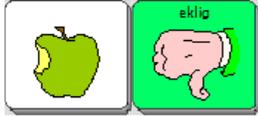
<p>mit</p>  <p>QK32 2014.11</p>	<p>ohne</p>  <p>QK32 2014.11</p>	<p>viel</p>  <p>QK32 2014.11</p>	<p>wenig</p>  <p>QK32 2014.11</p>
<p>lecker</p>  <p>QK32 2014.11</p>	<p>ekelig</p>  <p>QK32 2014.11</p>	<p>ich möchte</p>  <p>QK32 2014.11</p>	


mit

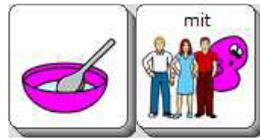

QK45

2014.11


ohne

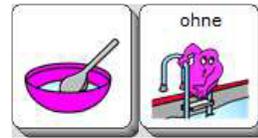

QK45

2014.11


viel

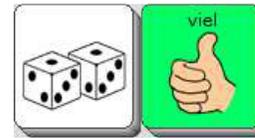

QK45

2014.11

wenig

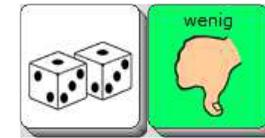

QK45

2014.11


lecker



QK45

2014.11

ekelig

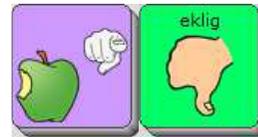

QK45

2014.11

ich möchte



QK45

2014.11


mit



QK60

2014.11

ohne

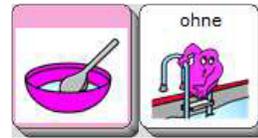

QK60

2014.11

viel



QK60

2014.11

wenig



QK60

2014.11

erst



QK60

2014.11

dann



QK60

2014.11

lecker



QK60

2014.11

ekelig



QK60

2014.11

ich möchte



QK60

2014.11

mit



WS84

2014.11

ohne



WS84

2014.11

viel



WS84

2014.11

wenig



WS84

2014.11


erst



WS84

2014.11

dann

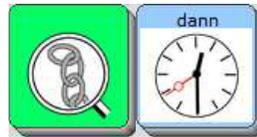

WS84

2014.11

lecker



WS84

2014.11

ekelig



WS84

2014.11


ich möchte



WS84

2014.11


mit

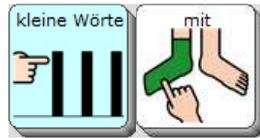

METACHAT

2014.11


ohne

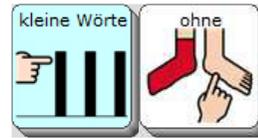

METACHAT

2014.11

viel

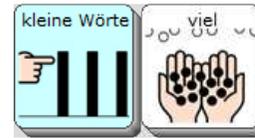

METACHAT

2014.11

wenig



METACHAT

2014.11

zuerst



METACHAT

2014.11


dann



METACHAT

2014.11


lecker

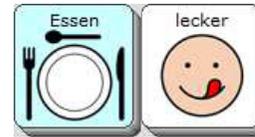

METACHAT

2014.11

eklig

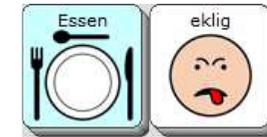

METACHAT

2014.11

ich möchte



METACHAT

2014.11