



PRD-WÖRTER DES MONATS

bitte – danke


METACOM-SYMBOLE

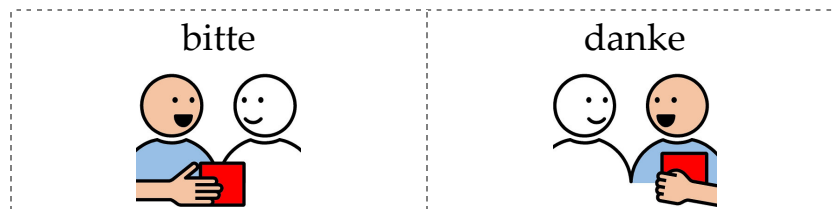


QUASSELKISTE 32

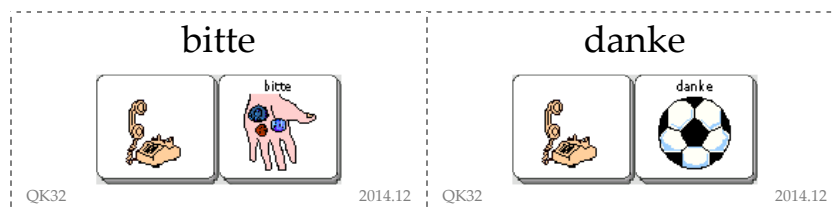


QUASSELKISTE 45 NEU

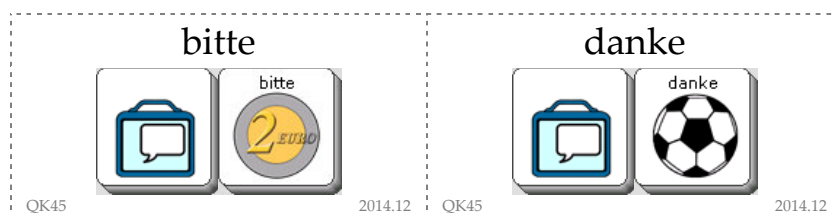


QUASSELKISTE 60 NEU

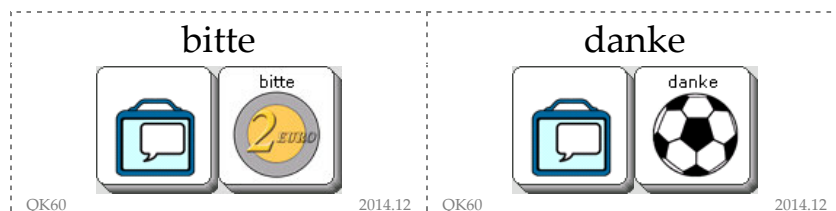

WORTSTRATEGIE 84 NEU

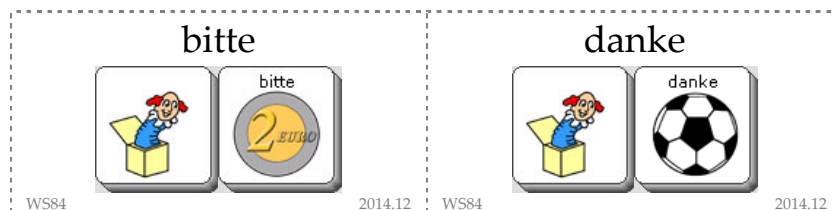

METACHAT

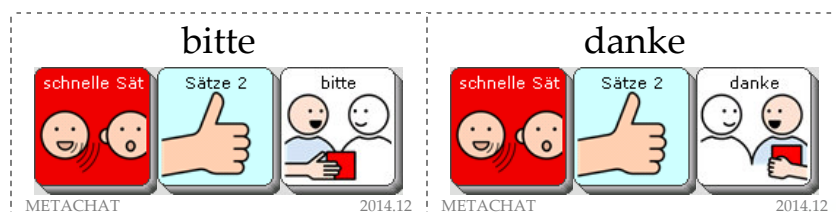

PRD-WÖRTER DES MONATS

bitte – danke

BEIM SCHENKEN

Das Schenken ist ein klassischer Anlass für die Nutzung der Wörter „bitte“ und „danke“. Und mit dem Weihnachtsfest steht eine gute Gelegenheit hierfür bevor.

IM ALLTAG

Beobachten Sie gemeinsam mit Ihrem Benutzer, in welchen Situationen andere Personen im Alltag „bitte“ und „danke“ sagen: z.B. wenn jemand den Brotkorb über den Tisch reicht, wenn man beim Bäcker etwas bestellt oder wenn jemand die Tür aufhält.

IN MEHRWORTÄUßERUNGEN

Zeigen Sie Ihrem Benutzer, wie er die Wörter „bitte“ und „danke“ in Mehrwortäußerungen verwenden kann, z.B. „Ich möchte *bitte* Kuchen.“ oder „*Danke* für den Kuchen!“.

„DAS IST FÜR MICH!“ (PRD-IDEEN DES MONATS FEBRUAR 2013)

Verschiedene Tierarten haben unterschiedliche Vorlieben. In dieser Idee können die Tiere jeweils äußern, was sie *bitte* haben möchten.

„WIR MACHEN EINE UMFRAGE“ (BEST OF PRD-IDEEN DES MONATS KAPITEL 9 TIPP 2)

Bei dieser Umfrage werden die Teilnehmer z.B. gefragt, was sie sich zu Weihnachten wünschen. Die Antwort soll jeweils als Bild gemalt werden: „Kannst du das *bitte* malen?“ Wenn das Bild fertig ist, bedankt sich die Gruppe: „*Danke* schön!“.

„BOTENGÄNGE ÜBERNEHMEN“ / „AMT ÜBERNEHMEN“ (ENTDECKE DIE KRAFT DER SPRACHE MIT DEM MINSPEAK-ZIELVOKABULAR LB4 D) (ENTDECKE DIE KRAFT DER SPRACHE MIT TASTEN ODER MIT DEM GOTALK20+ LB 4 B)

Wenn ein UK-Benutzer z.B. Kreide aus dem Sekretariat holt, Brötchen beim Bäcker bestellt oder in der Nachbarklasse nach Klebeband fragt, kann er hierbei die Verwendung der Wörter „bitte“ und „danke“ üben.

„SOZIALE UMGANGSFORMEN“ (ENTDECKE DIE KRAFT DER SPRACHE MIT DEM MINSPEAK-ZIELVOKABULAR LB5 A) (ENTDECKE DIE KRAFT DER SPRACHE MIT EINFACHEN HILFEN LB 5 A)

Zu den sozialen Umgangsformen gehört es unter anderem, die Wörter „bitte“ und „danke“ zu nutzen.

PRD-IDEEN DES MONATS

bitte – danke

Welche Farbe darf es sein?

Diese Idee kann für ganz unterschiedliche Aktivitäten genutzt werden: beim gemeinsamen Turmbau, beim Spielen mit Legosteinen, beim Auffädeln einer Perlenkette, beim Bildmalen oder z.B. beim Verziern eines Pfefferkuchenhauses.

DIESE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:

- Bauklötze, Legosteine, Perlen, Stifte, Smarties oder Gummibären in unterschiedlichen Farben
- je nach Aktivität z.B. Kette, Papier oder Pfefferkuchenhaus

DIESE PRD-PRODUKTE KÖNNEN EINGESETZT WERDEN:

- 2 sprechende Tasten (z.B. BIGmacks oder Step-by-Steps)
- GoTalk9+, GoTalk20+ oder SuperTalker
- Minspeak-Anwendungsprogramme „Quasselkiste 32 / 45 / 60“ oder „Wortstrategie 84“
- Anwendungsprogramm „MetaChat“

DAS GEHÖRT ZUR VORBEREITUNG:

- Beim Einsatz sprechender Tasten kennzeichnen Sie die Geräte mit Symbolen und nehmen die entsprechenden Aussagen auf.
- Zur Benutzung des GoTalks bzw. SuperTalkers verwenden Sie das beigegefügte Deckblatt. Besprechen Sie das Gerät gemäß den Vorschlägen. Ergänzen Sie ggf. weitere Farben auf dem Deckblatt.
- Verwendet Ihr Talkerbenutzer ein Anwendungsprogramm, drucken Sie die Datei mit den Ikonensequenzen des entsprechenden Programms aus. Erstellen Sie einzelne Wortkarten.

JETZT KANN ES LOSGEHEN!

- „Verwalten“ Sie die Bauklötze, Legosteine, Perlen, Stifte, Smarties oder Gummibären in den unterschiedlichen Farben.
- Lassen Sie Ihren UK-Benutzer eine Farbe auswählen, z.B. „bitte blau“.
- Überreichen Sie Ihrem Benutzer je nach motorischen Möglichkeiten entweder den entsprechenden Gegenstand oder assistieren Sie ihm bei der Verwendung des Gegenstands.
- Lassen Sie Ihren Benutzer immer wieder eine Farbe auswählen (z.B. „jetzt bitte rot“, „noch mal blau“ – „danke“), damit z.B. ein Turm, eine Perlenkette oder ein Pfefferkuchenhaus nach seinen farblichen Vorstellungen entstehen kann.

SO KANN ES WEITERGEHEN:

Vermitteln Sie den Einsatz der Wörter „bitte“ und „danke“ auch in anderen Spiel- und Alltagssituationen. Weitere Ideen finden Sie in dieser Datei auf Seite 2.

Die „PRD-Ideen des Monats“ sind ein kostenloser Service der Prentke Romich GmbH.

Nutzung auf eigene Gefahr. Die Prentke Romich GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die aus der Befolgung der hier gemachten Angaben resultieren könnten.

Das Ein- bzw. Austragen in den Newsletter erfolgt unter www.prentke-romich.de.

Prentke Romich GmbH

Elektronische Kommunikationshilfen

Goethestr. 31

34119 Kassel


Tel. (0561) 78559-0

Fax (0561) 78559-29

E-Mail info@prentke-romich.de


Web www.prentke-romich.de








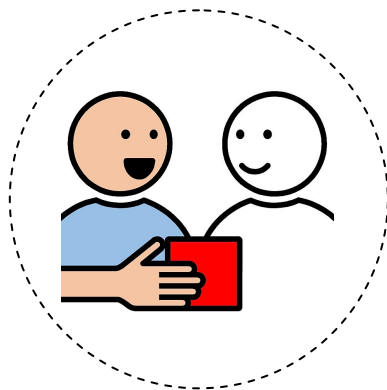


Bitte gelb!
Bitte rot!
Bitte grün!
Bitte blau!

Danke!

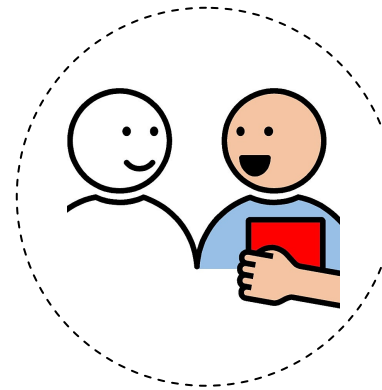


Feld 1: „bitte“
 Feld 2: „danke“
 Feld 3: -
 Feld 4: -
 Feld 5: „rot“
 Feld 6: „gelb“
 Feld 7: „blau“
 Feld 8: „grün“

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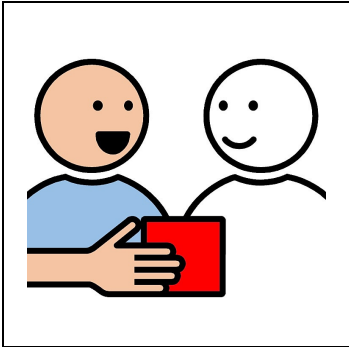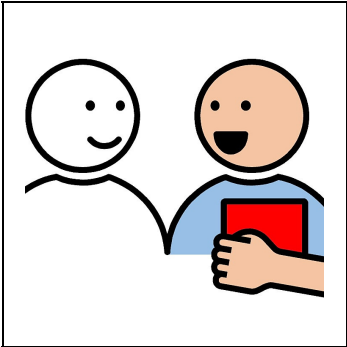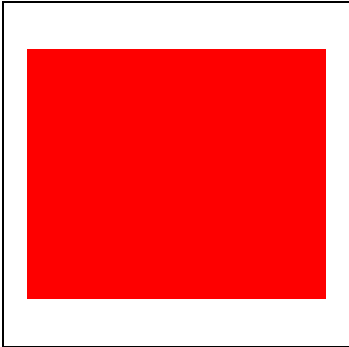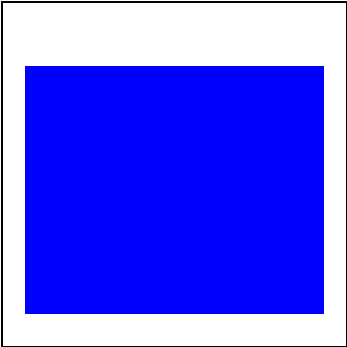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SuperTalker		© Prentke Romich GmbH 2014	Symbole: Annette Kitzing
			
			
EBENE		Welche Farbe darf es sein?	TASTEN
			8



bitte

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danke



rot

gelb



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
grün







blau






lila



bitte
danke

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


gelb

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


rot

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blau






grün



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



lila

rosa

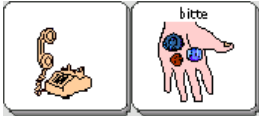bitte  QK32 2014.12	danke  QK32 2014.12	jetzt  QK32 2014.12	noch Mal  QK32 2014.12
blau  QK32 2014.12	rot  QK32 2014.12	gelb  QK32 2014.12	grün  QK32 2014.12
orange  QK32 2014.12	schwarz  QK32 2014.12	weiß  QK32 2014.12	braun  QK32 2014.12

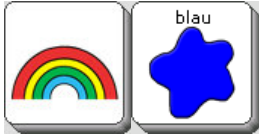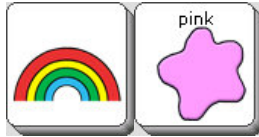bitte  QK45 2014.12	danke  QK45 2014.12	jetzt  QK45 2014.12	noch mal  QK45 2014.12
blau  QK45 2014.12	rot  QK45 2014.12	gelb  QK45 2014.12	grün  QK45 2014.12
orange  QK45 2014.12	schwarz  QK45 2014.12	weiß  QK45 2014.12	pink  QK45 2014.12
braun  QK45 2014.12	grau  QK45 2014.12		

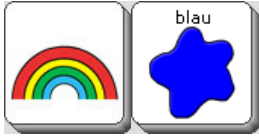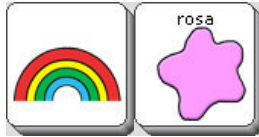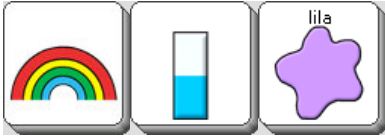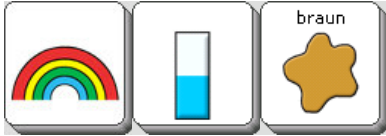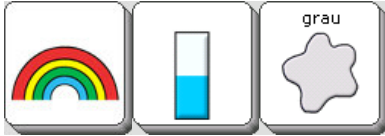bitte  QK60 2014.12	danke  QK60 2014.12	jetzt  QK60 2014.12	noch mal  QK60 2014.12
blau  QK60 2014.12	rot  QK60 2014.12	gelb  QK60 2014.12	grün  QK60 2014.12
orange  QK60 2014.12	schwarz  QK60 2014.12	weiß  QK60 2014.12	rosa  QK60 2014.12
lila  QK60 2014.12	braun  QK60 2014.12	grau  QK60 2014.12	

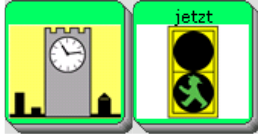bitte  WS84 2014.12	danke  WS84 2014.12	jetzt  WS84 2014.12	noch mal  WS84 2014.12
blau  WS84 2014.12	rot  WS84 2014.12	gelb  WS84 2014.12	grün  WS84 2014.12
orange  WS84 2014.12	schwarz  WS84 2014.12	weiß  WS84 2014.12	rosa  WS84 2014.12
braun  WS84 2014.12	grau  WS84 2014.12		

bitte



METACHAT

2014.12

danke



METACHAT

2014.12

jetzt



METACHAT

2014.12

noch mal



METACHAT

2014.12

blau



METACHAT

2014.12

rot



METACHAT

2014.12

gelb



METACHAT

2014.12

grün



METACHAT

2014.12

orange



METACHAT

2014.12

schwarz



METACHAT

2014.12

weiß



METACHAT

2014.12

rosa



METACHAT

2014.12

lila



METACHAT

2014.12

braun



METACHAT

2014.12

grau



METACHAT

2014.12

hellblau



METACHAT

2014.12