



PRD-WÖRTER DES MONATS

zusammen – allein


METACOM-SYMBOLLE

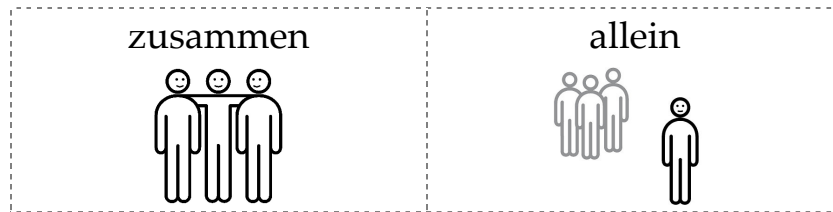


QUASSELKISTE 32

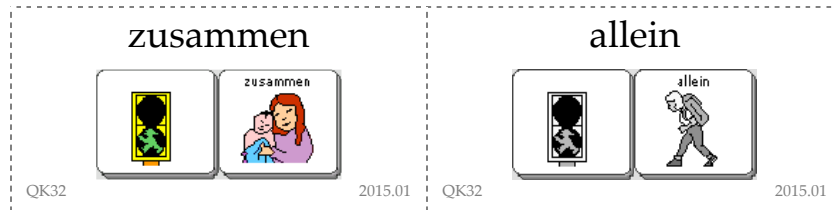


QUASSELKISTE 45 NEU

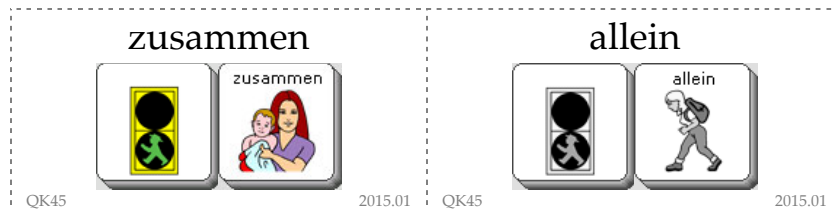


QUASSELKISTE 60 NEU

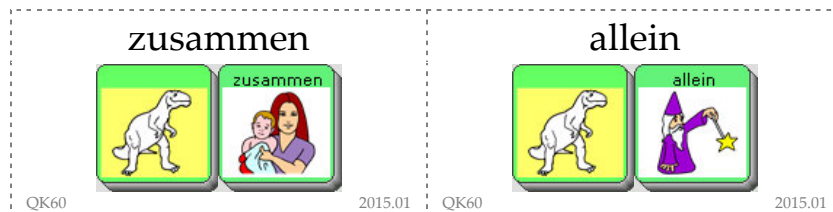

WORTSTRATEGIE 84 NEU

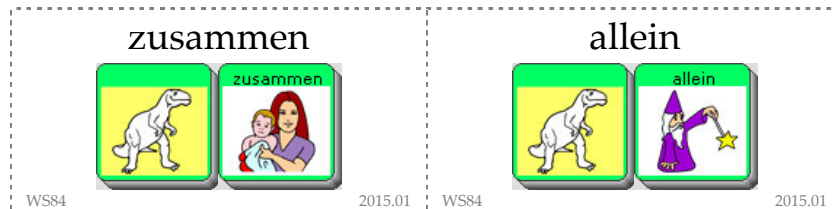

METACHAT

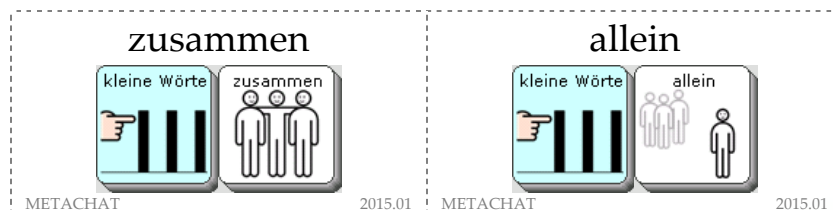

PRD-WÖRTER DES MONATS

zusammen – allein

IM ALLTAG

Verwenden Sie die Wörter *zusammen* und *allein* immer wieder im Alltag. Wobei braucht Ihr Benutzer Hilfe? Welche Dinge kann er *allein*?

BEI AKTIVITÄTEN

Fragen Sie Ihren Benutzer bei verschiedenen Aktivitäten, ob der diese lieber *zusammen* oder *allein* machen möchte: Möchte er *zusammen* oder *allein* spielen? Möchte er *zusammen* oder *allein* malen? Möchte er sich *zusammen* oder *allein* ein Buch anschauen?

VORLIEBEN

Sprechen Sie in der Gruppe darüber, welche Vorlieben die verschiedenen Personen haben: Was sind Dinge, die jemand gern *zusammen* mit anderen oder *allein* macht? Haben die Personen die gleichen oder ganz unterschiedliche Vorlieben?

„ICH BIN DIRIGENT!“ (PRD-IDEEN DES MONATS MÄRZ 2012)

Beim Musizieren kann der Dirigent u.a. entscheiden, ob alle Musiker *zusammen* oder auch einzelne Musiker *allein* spielen sollen.

„GESCHICHTEN ERFINDEN“ (BEST OF PRD-IDEEN DES MONATS KAPITEL 7 TIPP 1)

Der Benutzer kann u.a. durch die Vorgabe des Wortes *zusammen* den Verlauf der zu erfindenden Geschichte I beeinflussen.

„BILD MALEN“ „SPIEL AUF DEM AUTOTEPPICH“ „INTERAKTIONSSTEUERENDE AUSSAGEN VERWENDEN“ (ENTDECKE DIE KRAFT DER SPRACHE MIT DEM MINSPEAK-ZIELVOKABULAR LB 2E, 3D, 4H)

Bei all diesen Anwendungsbeispielen hat der Benutzer u.a. durch die Nutzung des Wortes *zusammen* die Möglichkeit, Einfluss auf den Verlauf der Interaktion zu nehmen.

„SOZIALE UMGANGSFORMEN“ (ENTDECKE DIE KRAFT DER SPRACHE MIT DEM MINSPEAK-ZIELVOKABULAR LB5 A)

Zu den sozialen Umgangsformen gehört es, um Hilfe zu bitten bzw. mitzuteilen, ob man etwas *allein* machen kann.

PRD-IDEEN DES MONATS

zusammen – allein

Tanzball

Bei diesem Ball tanzt man mal zusammen, mal allein: Nach jedem Lied entscheidet das Los neu, ob man zusammen mit einem anderen Besucher oder allein zum Ball geht.

DIESE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:

- großer Raum
- Musik

DIESE PRD-PRODUKTE KÖNNEN EINGESETZT WERDEN:

- 2 sprechende Tasten (z.B. BIGmacks oder Step-by-Steps)
- GoTalk9+, GoTalk20+ oder SuperTalker
- Minspeak-Anwendungsprogramme „Quasselkiste 32 / 45 / 60“ oder „Wortstrategie 84“
- Anwendungsprogramm „MetaChat“

DAS GEHÖRT ZUR VORBEREITUNG:

- Beim Einsatz sprechender Tasten kennzeichnen Sie die Geräte mit Symbolen und nehmen die entsprechenden Aussagen auf.
- Zur Benutzung des GoTalks bzw. SuperTalkers verwenden Sie das beigegefügte Deckblatt. Besprechen Sie das Gerät gemäß den Vorschlägen.
- Verwendet Ihr Talkerbenutzer ein Anwendungsprogramm, drucken Sie die Datei mit den Ikonensequenzen des entsprechenden Programms aus. Erstellen Sie einzelne Wortkarten und Satzstreifen.
- Bei Nutzung der „Quasselkiste 32“ oder „Quasselkiste 45“ speichern Sie das Wort „allein“ unter der vorgeschlagenen Sequenz im Anwendungsprogramm.
- Drucken Sie die Bildkarten aus. Schneiden Sie so viele Bildkarten aus, wie Personen teilnehmen. Halten Sie eine ähnliche Anzahl der Bildkarten „zusammen“ und „allein“ bereit (bei 9 Teilnehmern z.B. 4x „zusammen“ und 5x „allein“).

JETZT KANN ES LOSGEHEN!

- Eine Person legt die Musik für den Tanzball auf (ggf. mittels PowerLink).
- Vor jedem Lied ziehen die Ballbesucher ein Los, d.h. eine Bildkarte: das Los entscheidet, ob sie während der folgenden Liedes allein oder zusammen mit einer anderen Person auf den Ball gehen.
- Diejenigen, die das Los „zusammen“ gezogen haben, suchen nach einem Tanzpartner und fragen z.B. „Gehen wir zusammen?“. Nach jedem Lied werden erneut Lose gezogen.

SO KANN ES WEITERGEHEN:

Vermitteln Sie den Einsatz der Wörter „zusammen“ und „allein“ auch in anderen Spiel- und Alltagssituationen. Weitere Ideen finden Sie in dieser Datei auf Seite 2.

Die „PRD-Ideen des Monats“ sind ein kostenloser Service der Prentke Romich GmbH. Nutzung auf eigene Gefahr. Die Prentke Romich GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die aus der Befolgung der hier gemachten Angaben resultieren könnten. Das Ein- bzw. Austragen in den Newsletter erfolgt unter www.prentke-romich.de.

Prentke Romich GmbH

Elektronische Kommunikationshilfen

Goethestr. 31

34119 Kassel


Tel. (0561) 78559-0


Fax (0561) 78559-29

E-Mail info@prentke-romich.de

Web www.prentke-romich.de




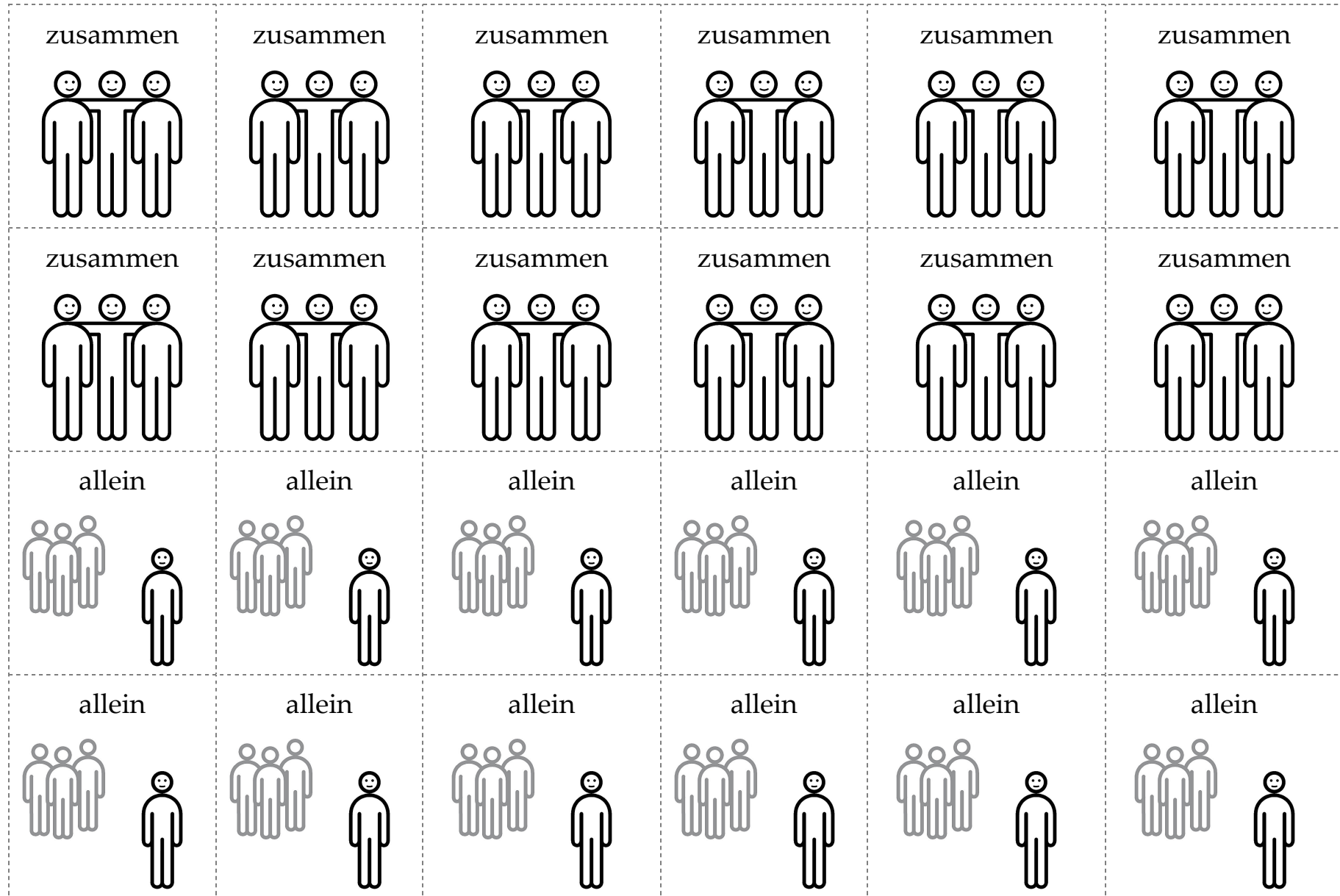

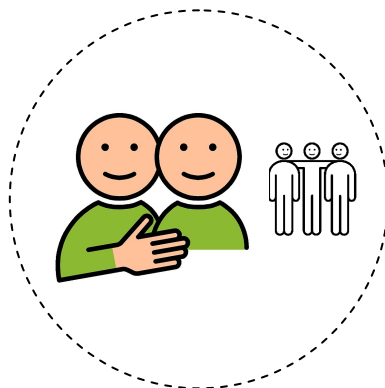




Gehen wir
zusammen?



Ich gehe allein.

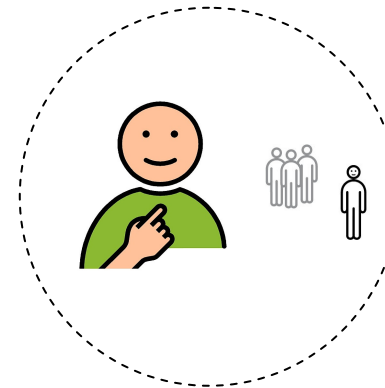

Feld 1: „Gehen wir zusammen?“



Feld 2: „Ich gehe allein.“

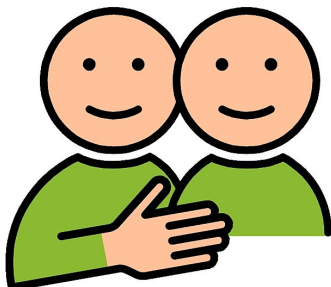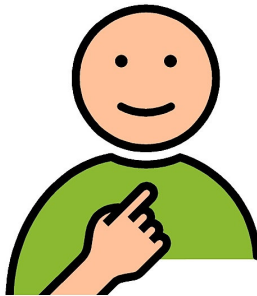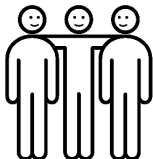SuperTalker		© Prentke Romich GmbH 2015		Symbole: Annette Kitzinger	
					
EBENE		Tanzball		TASTEN	
					

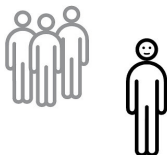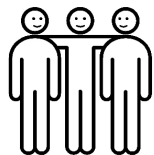



zusammen

allein

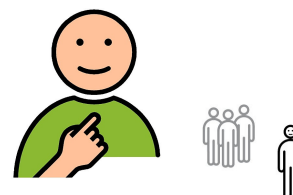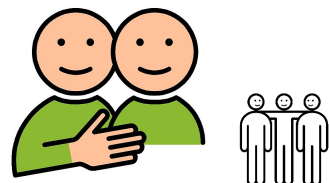





Gehen wir zusammen?





Ich gehe allein.

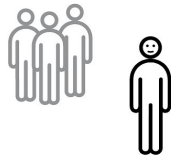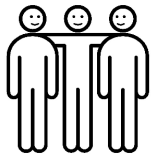

zusammen

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

allein







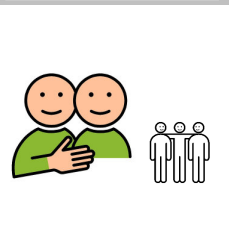

Gehen wir zusammen?

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Ich gehe allein.






zusammen  QK32 2015.01	allein  QK32 2015.01	wir  QK32 2015.01	ich  QK32 2015.01
---	---	--	--

gehen  wir  zusammen  QK32 2015.01

wir  zusammen  QK32 2015.01

ich  gehen  allein  QK32 2015.01

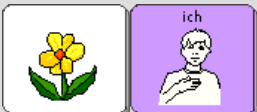ich  allein  QK32 2015.01

zusammen  QK45 2015.01	allein  QK45 2015.01	wir  QK45 2015.01	ich  QK45 2015.01
---	---	--	--

gehen   wir   zusammen   QK45 2015.01

wir   zusammen   QK45 2015.01

ich   gehe    allein   QK45 2015.01

ich   allein   QK45 2015.01

zusammen



QK60

2015.01

allein



QK60

2015.01

wir



QK60

2015.01

ich



QK60

2015.01

gehen



wir



zusammen



QK60 2015.01

ich gehe



allein



QK60 2015.01

zusammen



WS84

2015.01

WS84

allein



2015.01

WS84

wir



2015.01

WS84

ich



2015.01

gehen wir



zusammen



WS84 2015.01

ich gehe



allein



WS84 2015.01

zusammen  METACHAT 2015.01	allein  METACHAT 2015.01	wir  METACHAT 2015.01	ich  METACHAT 2015.01
--	--	---	---

gehen   **wir**  **zusammen**  

METACHAT 2015.01

ich   **allein**  

METACHAT 2015.01