

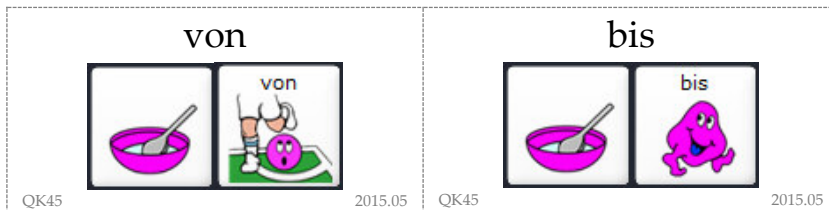
PRD-WÖRTER DES MONATS

von – bis


METACOM-SYMBOLE



QUASSELKISTE 45 NEU




QUASSELKISTE 60 NEU

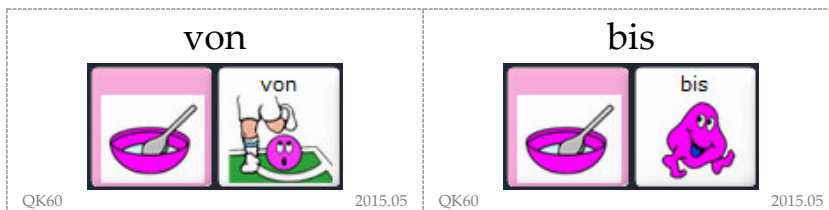


WORTSTRATEGIE 84 NEU



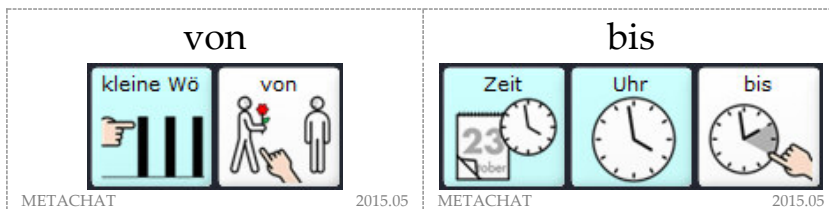METACHAT



LOGOFOXX 50

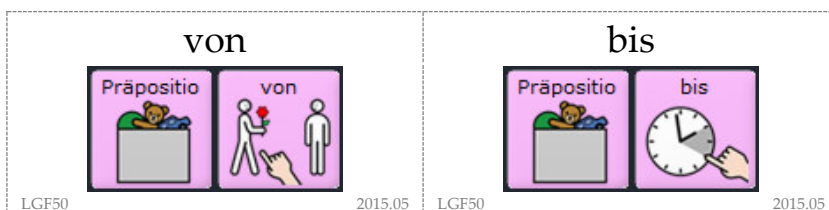

PRD-WÖRTER DES MONATS

von – bis

STUNDENPLAN / TAGESPLAN BESPRECHEN

Beim Besprechen des Stunden- bzw. Tagesplans kann sich Ihr Benutzer einbringen, in dem er erzählt, welche Aktivitäten *von* wann *bis* wann geplant sind.

WÜRFELSPIEL

Kommentieren Sie bei gemeinsamen Würfelspielen Ihre Spielzüge auf dem Spielfeld und verwenden Sie dabei die beiden Zielwörter: „Ich laufe von grün bis rot“ / „Ich laufe *von* hier *bis* da“.

BALL- ODER PUSTESPIEL

Gestalten Sie eine „Messskala“ für ein Puste- oder Wurfspiel mit Farbmarkierungen oder Gegenständen auf dem Boden. Wie weit wird gepustet und geworfen? Es darf auch vorher geschätzt werden!

„AN DER AMPEL“

(BEST OF PRD-IDEEN DES MONATS KAPITEL 8 TIPP 3)

Bei diesem Rollenspiel kann das Zielwort *bis* genutzt werden, denn alle müssen an der Ampel stehen *bis* es grün wird.

„SOZIALE UMGANGSFORMEN“

(ENTDECKE DIE KRAFT DER SPRACHE MIT DEM MINSPEAK-ZIELVOKABULAR LB5 A)

Experimentieren Sie mit verschiedenen Verabschiedungsfloskeln: „Bis später!“, „Bis gleich!“, „Bis bald!“ „Bis morgen!“, „Bis dann“. Wann passt welche Floskel?

PRD-IDEEN DES MONATS

von – bis

Ab in den Garten

Endlich ist wieder Frühling! Bei diesem Bewegungsspiel können sich alle im Freien richtig austoben!

DIESE PRD-PRODUKTE KÖNNEN EINGESETZT WERDEN:

- All-Turn-It-Spinner
- 1 oder 2 sprechende Tasten (z.B. 1 Step-by-Step oder 2 BIGmacks)
- GoTalk9+, GoTalk20+ oder SuperTalker
- Minspeak-Anwendungsprogramme „Quasselkiste 45 / 60“ oder „Wortstrategie 84“
- Anwendungsprogramme „MetaChat“ oder „LoGoFoXX 50“

DAS GEHÖRT ZUR VORBEREITUNG:

- Drucken Sie die Bildkarten aus und befestigen Sie diese auf einem Blanko-Deckblatt des All-Turn-It-Spinners.
- Beim Einsatz sprechender Tasten kennzeichnen Sie die Geräte mit Symbolen und nehmen die entsprechenden Aussagen auf.
- Zur Benutzung des GoTalks bzw. SuperTalkers verwenden Sie das beigelegte Deckblatt. Besprechen Sie das Gerät gemäß den Vorschlägen.
- Verwendet Ihr Talkerbenutzer ein Anwendungsprogramm, drucken Sie die Datei mit den Sequenzen des entsprechenden Programms aus.
- Beim Einsatz der „Quasselkiste 45“ muss die Äußerung „bis“ noch unter der Ikonensequenz „SCHÜSSEL“ – „WANDERN“ abgespeichert werden. In diesem Fall muss das letzte Ikon abgeändert werden. Der Suchbegriff für das Ikon ist „bis“.

JETZT KANN ES LOSGEHEN!

- Bestimmen Sie einen Spielleiter. Dieser legt mittels des All-Turn-It-Spinners den Start- und Zielpunkt des ersten Laufens fest
- Ein weiterer Mitspieler benennt nun mit Hilfe seines Kommunikationsgerätes die Lauf-Aufgabe (z.B.: „von Baum bis Stuhl“) und gibt das Startzeichen („jetzt“ oder „auf die Plätze, fertig, los!“). Abhängig von den Möglichkeiten des UK-Benutzers und seiner Kommunikationshilfe könnte dieser z.B. auch nur die Zielwörter „von“ und „bis“ äußern und ein anderer Mitspieler ergänzt den genauen Start- und Zielpunkt des Laufens.
- Dann wird gelaufen und gerannt! Sind alle Mitspieler am Ziel angekommen, wird eine neue Laufstrecke erwürfelt und angesagt. Die Rollen können dabei getauscht werden.

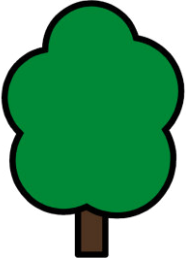
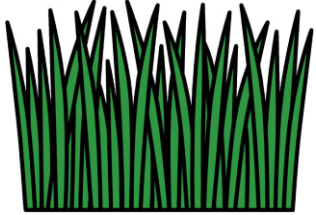
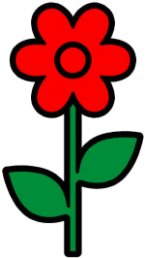
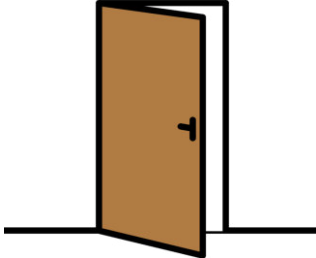
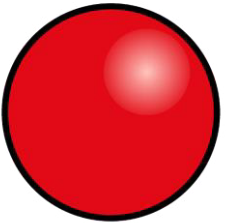
SO KANN ES WEITERGEHEN:

Vermitteln Sie den Einsatz der Wörter „von“ und „bis“ auch in anderen Spiel- und Alltagssituationen. Weitere Ideen finden Sie in dieser Datei auf Seite 2.


Die „PRD-Ideen des Monats“ sind ein kostenloser Service der Prentke Romich GmbH. Nutzung auf eigene Gefahr. Die Prentke Romich GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die aus der Befolgung der hier gemachten Angaben resultieren könnten. Das Ein- bzw. Austragen in den Newsletter erfolgt unter www.prentke-romich.de.

Prentke Romich GmbH
Elektronische Kommunikationshilfen
Goethestr. 31
34119 Kassel
Tel. (0561) 78559-0
Fax (0561) 78559-29
E-Mail info@prentke-romich.de
Web www.prentke-romich.de




Baum 	Gras 	Blume 	Stuhl 	Tür 
Ball 				

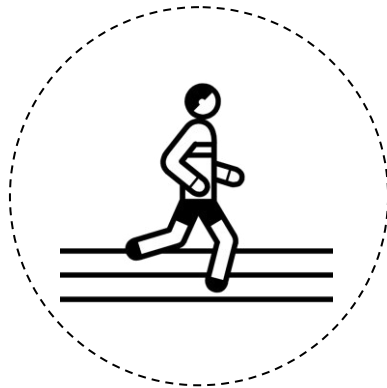Tastensymbol für eine sprechende Taste




Auf die Plätze,
fertig,
los!

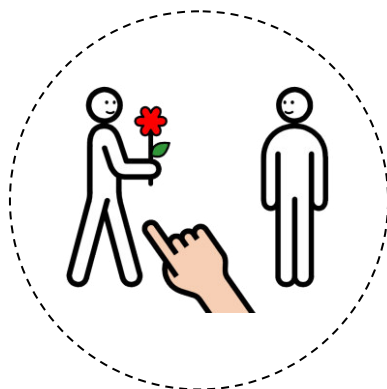Tastensymbole für zwei sprechende Tasten





von

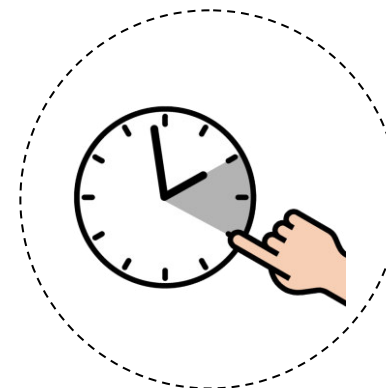bis




Feld 1: „von“

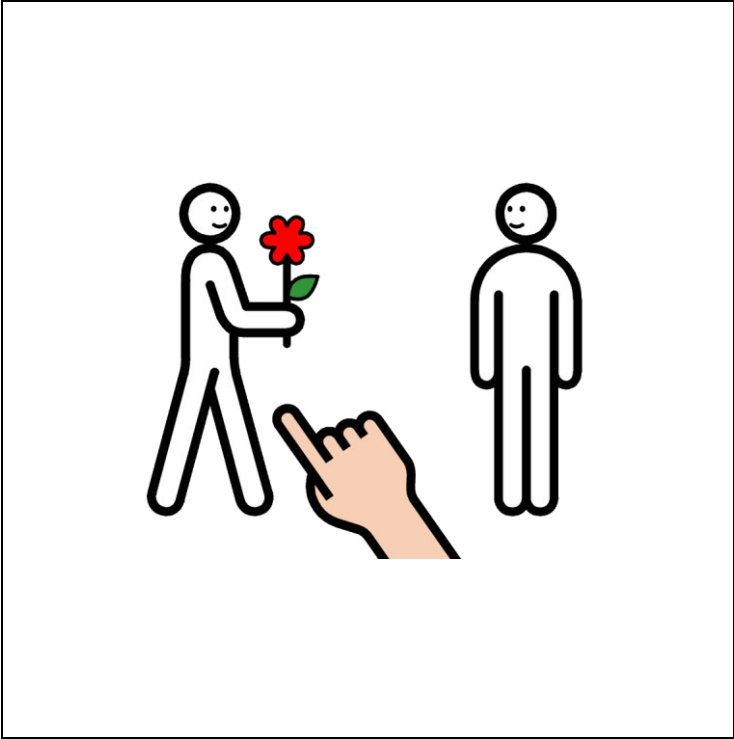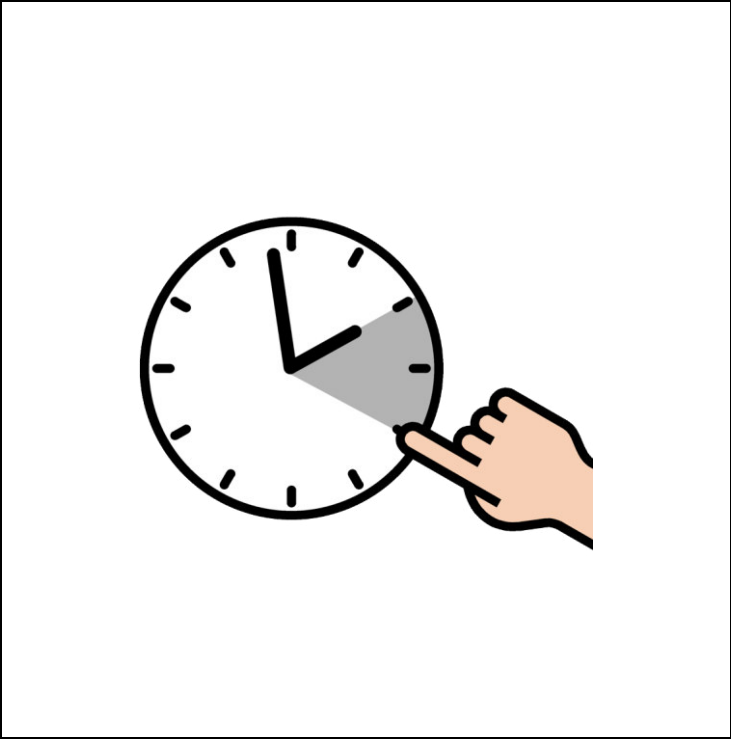Feld 2: „bis“

SuperTalker		© Prentke Romich GmbH 2015	Symbole: Annette Kitzinger
			
EBENE ○	Ab in den Garten	TASTEN ②	

Feld 1: „von“
 Feld 2: „Baum“
 Feld 3: „Ball“
 Feld 4: „Tür“
 Feld 5: „bis“
 Feld 6: „Blume“
 Feld 7: „Stuhl“
 Feld 8: „Gras“


	SuperTalker	© Prentke Romich GmbH 2015	Symbole: Annette Kitzinger	
EBENE		Ab in den Garten	TASTEN	8

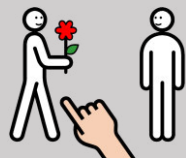


von

bis

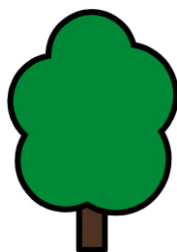Auf die Plätze, fertig, los!




Baum

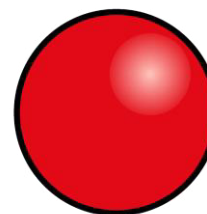


Ball



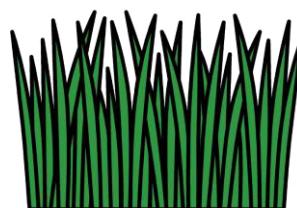Tür




Gras

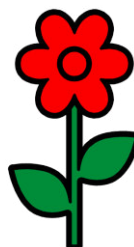

Blume



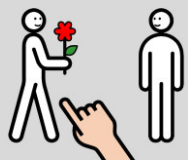Stuhl




von

bis


Auf die Plätze, fertig, los!



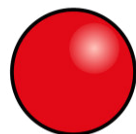
Baum



Ball

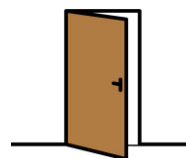

Tür

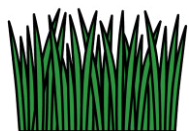








Gras














Blume



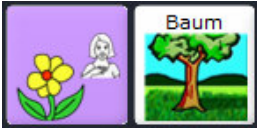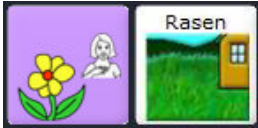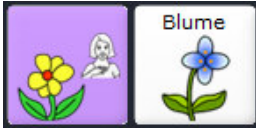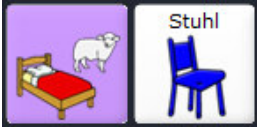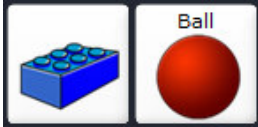
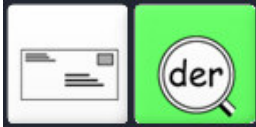
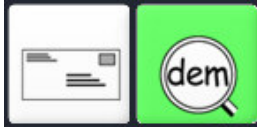
Stuhl

von  QK45 2015.05	bis  QK45 2015.05	jetzt  QK45 2015.05	laufen  QK45 2015.05
Baum  QK45 2015.05	Rasen  QK45 2015.05	Blume  QK45 2015.05	Tür  QK45 2015.05
Stuhl  QK45 2015.05	Ball  QK45 2015.05	der  QK45 2015.05	dem  QK45 2015.05

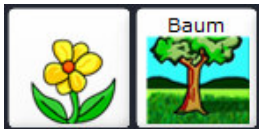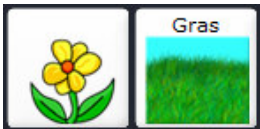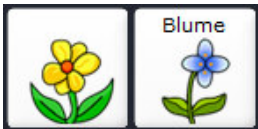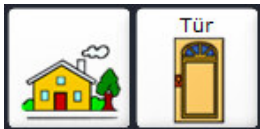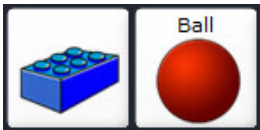von  QK60 2015.05	bis  QK60 2015.05	jetzt  QK60 2015.05	laufen  QK60 2015.05
Baum  QK60 2015.05	Gras  QK60 2015.05	Blume  QK60 2015.05	Tür  QK60 2015.05
Stuhl  QK60 2015.05	Ball  QK60 2015.05	der  QK60 2015.05	dem  QK60 2015.05

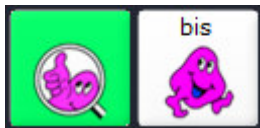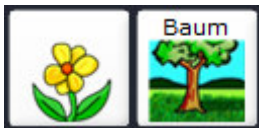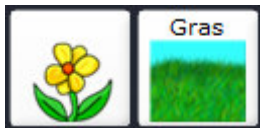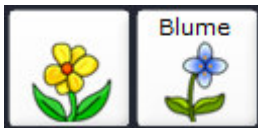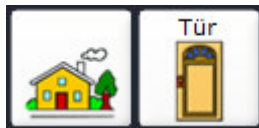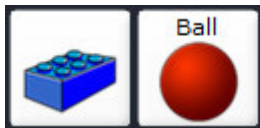von  WS84 2015.05	bis  WS84 2015.05	jetzt  WS84 2015.05	laufen  WS84 2015.05
Baum  WS84 2015.05	Rasen  WS84 2015.05	Blume  WS84 2015.05	Tür  WS84 2015.05
Stuhl  WS84 2015.05	Ball  WS84 2015.05	der  WS84 2015.05	dem  WS84 2015.05

von  METACHAT 2015.05	bis  METACHAT 2015.05	jetzt  METACHAT 2015.05	laufen  METACHAT 2015.05
Baum  METACHAT 2015.05	Gras  METACHAT 2015.05	Blume  METACHAT 2015.05	Tür  METACHAT 2015.05
Stuhl  METACHAT 2015.05	Ball  METACHAT 2015.05	der  METACHAT 2015.05	dem  METACHAT 2015.05

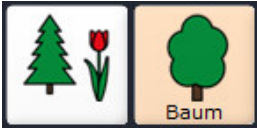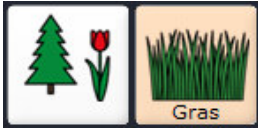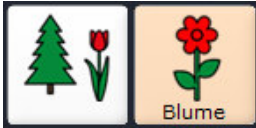von  Präpositio von LGF50 2015.05	bis  Präpositio bis LGF50 2015.05	jetzt  Adverbien jetzt LGF50 2015.05	laufen  Verben 2 laufen LGF50 2015.05
Baum  Baum LGF50 2015.05	Gras  Gras LGF50 2015.05	Blume  Blume LGF50 2015.05	Tür  Tür LGF50 2015.05
Stuhl  Möbel Stuhl LGF50 2015.05	Ball  Ball LGF50 2015.05	der  der LGF50 2015.05	dem  dem LGF50 2015.05