


PRD-WORT DES MONATS

mögen


METACOM-SYMBOL




QUASSELKISTE 45 V2.0

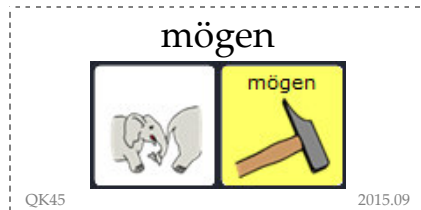


QUASSELKISTE 60 NEU

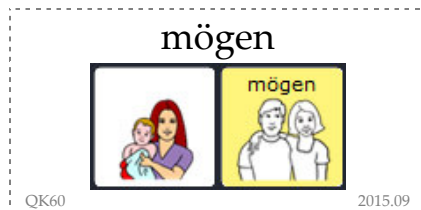


WORTSTRATEGIE 84 NEU

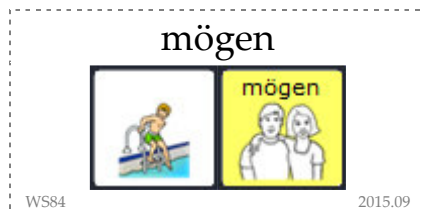

METACHAT

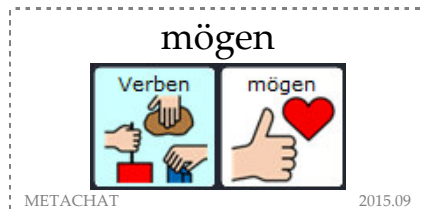

LOGOFOXX 50

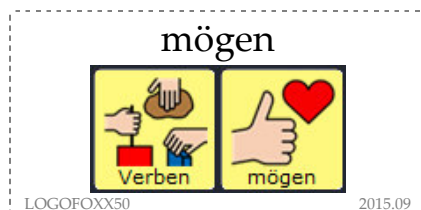

PRD-WORT DES MONATS

mögen

BEIM EINKAUFEN

Besprechen Sie beim gemeinsamen Einkauf, welche Lebensmittel sie *mögen* und welche nicht.

EINLADUNG ZUM FEST

Steht ein Geburtstag mit einem Fest an? Wer aus der Kindergartengruppe, der Klasse oder der Werkstattgruppe soll eingeladen werden? Wer wird gemocht und wer nicht so sehr?

KATALOGE / ZEITSCHRIFTEN DURCHBLÄTTERN

Kommentieren Sie beim Betrachten von Katalogen und Zeitschriften verschiedene Bilder und Fotos. Wer mag welche Mode, welche Schauspieler, welche Tiere...?

„IN DER PIZZABÄCKEREI“ (BEST OF PRD-IDEEN DES MONATS KAPITEL 2 TIPP 2)

Bei dieser Bastelaktion können die Pizzabäcker unter anderem mit der Äußerung „Das mag ich gern“ das Geschehen beeinflussen und die fertigen Pizzen kommentieren.

„ICH-INFORMATIONEN“ (ENTDECKE DIE KRAFT DER SPRACHE MIT EINFACHEN SPRACHAUSGABEGERÄTEN LB3 A)

Nutzer eines GoTalks oder eines SuperTalkers haben die Möglichkeit, von sich zu erzählen.

„OBSTSORTEN PROBIEREN“ (ENTDECKE DIE KRAFT DER SPRACHE MIT EINFACHEN SPRACHAUSGABEGERÄTEN LB4 J)

Mittels der Aussagen „Das mag ich gern“ und „Das mag ich nicht“ kann der Geschmack verschiedener Obstsorten bewertet werden.

PRD-IDEEN DES MONATS

mögen

Steckbrief

Nach den Sommerferien gibt es neue Gesichter in der Kindergartengruppe und der Klasse. Unsere Idee hilft beim gegenseitigen Kennenlernen!

Im ersten Teil der Aktivität gestaltet jeder Teilnehmer seinen eigenen Steckbrief.

Im zweiten Teil stellen sich die Teilnehmer mit Hilfe des Steckbriefes vor und erzählen von ihren Vorlieben und Abneigungen.

DIESE PRD-PRODUKTE KÖNNEN EINGESETZT WERDEN:

- 1 oder 2 sprechende Tasten (z.B. BIGmack oder Step-by-Step)
- GoTalk9+, GoTalk20+ oder SuperTalker
- Minspeak-Anwendungsprogramme „Quasselkiste 45 / 60“ oder „Wortstrategie 84“
- Anwendungsprogramme „MetaChat“ oder „LoGoFoXX 50“

DAS GEHÖRT ZUR VORBEREITUNG:

- Drucken Sie für jeden Nutzer eine Vorlage des Steckbriefs aus.
- Beim Einsatz sprechender Tasten kennzeichnen Sie die Geräte mit Symbolen und nehmen die entsprechenden Aussagen auf.
- Zur Benutzung des GoTalks bzw. SuperTalkers verwenden Sie das beigelegte Deckblatt. Besprechen Sie das Gerät gemäß den Vorschlägen.
- Beim Einsatz sprechender Tasten, der GoTalks und des SuperTalkers können unterschiedliche Äußerungen für die Erstellung des Steckbriefs (Situation 1) und die Vorstellungsrunde (Situation 2) aufgenommen werden. Wird das Hilfsmittel in Situation 2 eingesetzt, ergänzen Sie die Vorlieben und Abneigungen, die auf dem Steckbrief dargestellt sind.
- Verwendet Ihr Talkerbenutzer ein Anwendungsprogramm, drucken Sie die Datei mit den Sequenzen des entsprechenden Programms aus. Nutzt Ihr Talkerbenutzer die „Quasselkiste 45 V2.0“ speichern Sie unter der Ikonensequenz ZAUBERER-WÜRFEL noch das Alter („Ich bin ... Jahre alt“) ab.

JETZT KANN ES LOSGEHEN

- Gestalten Sie die Steckbriefe mit Fotos, Bildern aus Katalogen und Zeitschriften, eigenen Zeichnungen oder mit Schrift. Lassen Sie dabei den Nutzer entscheiden bzw. kommentieren, ob er etwas mag oder nicht.
- In der darauffolgenden Vorstellungsrunde kann sich jeder Nutzer vorstellen und erzählen, was er mag und was nicht.

SO KANN ES WEITERGEHEN:

Vermitteln Sie den Einsatz des Wortes „mögen“ auch in anderen Spiel- und Alltagssituationen. Weitere Ideen finden Sie in der Datei auf Seite 2.

Die „PRD-Ideen des Monats“ sind ein kostenloser Service der Prentke Romich GmbH. Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Die Prentke Romich GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die aus der Befolgung der hier gemachten Angaben resultieren könnten. Das Ein- bzw. Austragen in den Newsletter erfolgt unter www.prentke-romich.de.

Prentke Romich GmbH
Elektronische Kommunikationshilfen
Goethestr. 31
34119 Kassel
Tel. (0561) 78559-0
Fax (0561) 78559-29
E-Mail info@prentke-romich.de
Web www.prentke-romich.de





Ich heiße



Ich bin

Jahre alt.

Platz für Foto




Ich mag:



Ich mag nicht:

Tastensymbol für eine sprechende Taste (*Situation 1*)

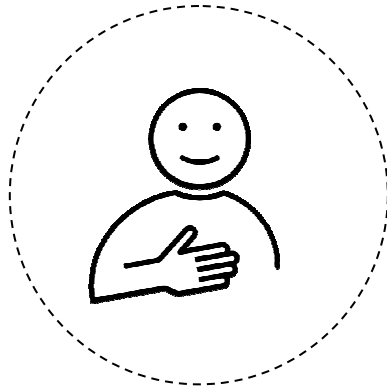

Ich heiße...
(*ergänzen*).
Ich bin ...(*ergänzen*)
Jahre alt.
Ich mag...(*ergänzen*).
Ich mag nicht ...
(*ergänzen*)

Tastensymbole für zwei sprechende Tasten (*Situation 1 und 2*)



Ich mag das.
(*Situation 1*)


oder:

Ich mag ...(*ergänzen*)
(*Situation 2*)

Ich mag das nicht.
(*Situation 1*)

oder:

Ich mag
nicht...(*ergänzen*)
(*Situation 2*)

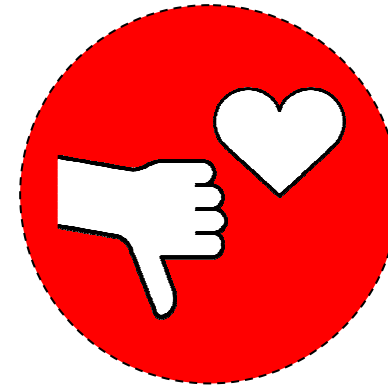

Feld 1: „Ich heiße...“

Feld 2: -

Feld 3: „Ich mag das“ (Situation 1) oder: „Ich mag...“ (Situation 2)

Feld 4: -

Feld 5: „Ich bin ... Jahre alt.“

Feld 6: -

Feld 7: Feld 8: „Ich mag das nicht.“ (Situation 1) oder: „Ich mag ... nicht.“ (Situation 2)

SuperTalker		© Prentke Romich GmbH 2015		Symbole: Annette Kitzinger	
EBENE		Steckbrief	TASTEN	8	

individuelles
Kernvokabular

individuelles
Kernvokabular

individuelles
Kernvokabular



Ich heiße...

Ich bin ... Jahre alt.



Ich mag das (Situation 1)
oder
Ich mag...(Situation 2)

toll



Ich mag das nicht
(Situation 1) oder
Ich mag nicht...(Situation 2)

doof

ist
doof

i

individuelles
Kernvokabular

individuelles
Kernvokabular

individuelles
Kernvokabular

individuelles
Kernvokabular

individuelles
Kernvokabular



Ich heiße ...

Ich bin ... Jahre alt.



Ich mag das (Situation 1)
oder Ich mag... (Situation 2)


toll



Ich mag das nicht (Situation 1)
oder Ich mag nicht... (Situation 2)

doof

ich heiße ...

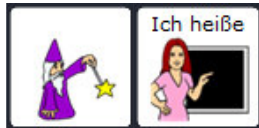

QK45

2015.09

ich bin ... Jahre alt



QK45

2015.09

ich



QK45

2015.09

mögen



QK45

2015.09

ich mag



QK45

2015.09

das



QK45

2015.09


das ist



QK45

2015.09


nicht

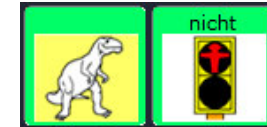

QK45

2015.09


richtig

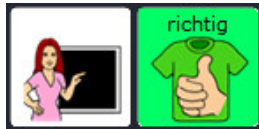

QK45

2015.09


toll

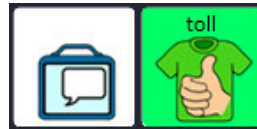

QK45

2015.09


doof

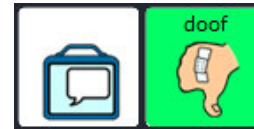

QK45

2015.09

ich heiße ...

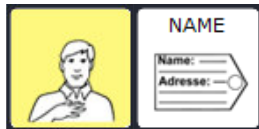

QK60

2015.09

ich bin ... Jahre alt



QK60

2015.09

ich



QK60

2015.09

mögen



QK60

2015.09


ich mag



QK60

2015.09


finde

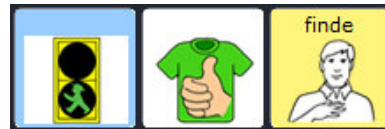

QK60

2015.09

ist

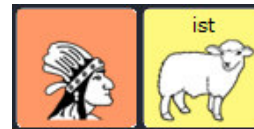

QK60

2015.09

das



QK60

2015.09

nicht



QK60

2015.09


echt



QK60

2015.09


richtig

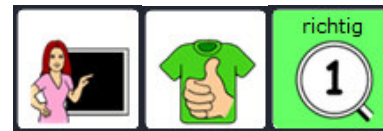

QK60

2015.09

toll

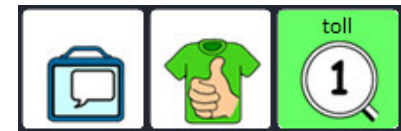

QK60

2015.09


doof



QK60

2015.09


ich heiße ...

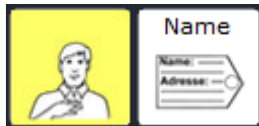

WS84

2015.09

ich bin ... Jahre alt

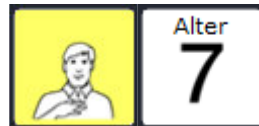

WS84

2015.09


ich



WS84

2015.09


mögen

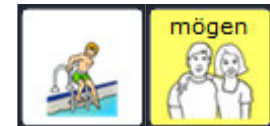

WS84

2015.09

ich mag

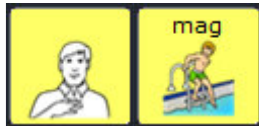

WS84

2015.09

finde



WS84

2015.09

ist



WS84

2015.09

das



WS84

2015.09

nicht



WS84

2015.09


echt



WS84

2015.09


richtig

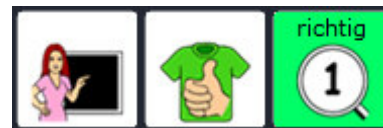

WS84

2015.09

toll

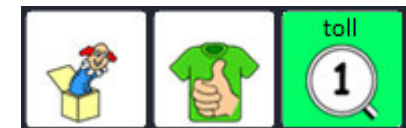

WS84

2015.09

doof



WS84

2015.09


ich heiße ...



METACHAT

2015.09

ich bin ... Jahre alt

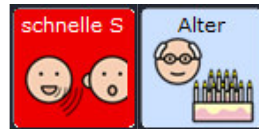

METACHAT

2015.09

ich



METACHAT

2015.09

mögen



METACHAT

2015.09

ich mag



METACHAT

2015.09

ich finde



METACHAT

2015.09

das



METACHAT

2015.09

das ist



METACHAT

2015.09

nicht



METACHAT

2015.09


richtig



METACHAT

2015.09

toll

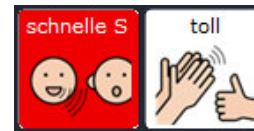

METACHAT

2015.09

doof



METACHAT

2015.09

ich heiße ...



LGF50

2015.09

ich bin ... Jahre alt



LGF50

2015.09

ich



LGF50

2015.09

mögen



LGF50

2015.09

ich mag



LGF50

2015.09


ich finde



LGF50

2015.09

ist

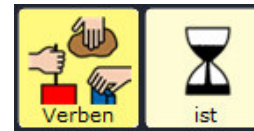

LGF50

2015.09

das



LGF50

2015.09

nicht



LGF50

2015.09

echt



LGF50

2015.09

richtig



LGF50

2015.09

toll



LGF50

2015.09

doof



LGF50

2015.09