



PRD-WORT DES MONATS

auch

METACOM-SYMBOL

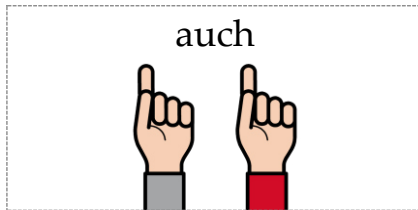


QUASSELKISTE 45 V2.0

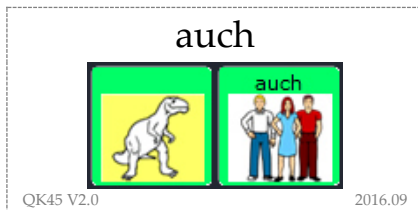

QK45 V2.0

2016.09


QUASSELKISTE 60 NEU

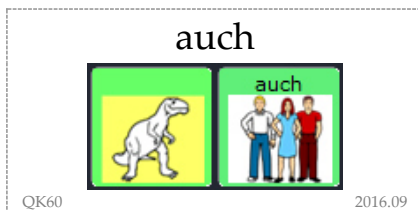

QK60

2016.09


WORTSTRATEGIE 84 NEU

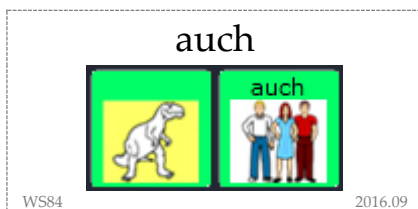

WS84

2016.09


METACHAT

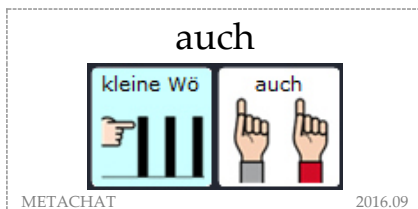

METACHAT

2016.09

LOGOFOXX 50

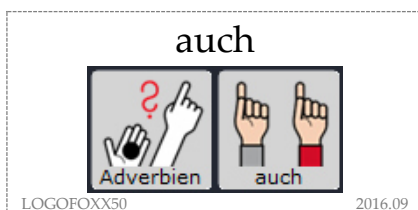

LOGOFOXX50

2016.09

PRD-WORT DES MONATS

auch

GEGENSTÄNDE KATEGORISIEREN

Besprechen Sie mit Ihrem UK-Benutzer verschiedene Funktionen von Gegenständen (z.B.: das kann man trinken, das kann fahren, das kann man essen). Auf welche anderen Gegenstände trifft das „auch“ zu und auf welche nicht?

„SO EIN QUATSCH“ (PRD-IDEE DES MONATS MÄRZ 2014)

In dem Bilderbuch „Da stimmt doch was nicht“ können viele seltsame Dinge entdeckt werden. Kommentieren Sie Schuhe im Kühlschrank, Fische im Toaster mit Äußerungen wie „Quatsch“, „verrückt“, „lustig“ etc. Das Zielwort „auch“ kann dabei ebenfalls eingesetzt werden.

„FRÜHLINGSBILD“ (PRD-IDEE DES MONATS APRIL 2014)

Bei dieser Bastelaktion kann das Bild nach ganz eigenen Vorstellungen gestaltet werden und der UK-Benutzer bestimmt die Positionen der aufzuklebenden Gegenstände und Tiere. Soll der Vogel „auch“ nach oben auf das Bild und der Hase „auch“ nach unten?

„ES WECHSELN ALLE DIE PLÄTZE“ (BEST OF PRD-IDEEN DES MONATS KAPITEL 1 TIPP 2)

Dieses Bewegungsspiel ermöglicht den Teilnehmern, Gemeinsamkeiten und Unterschiede festzustellen. Das Zielwort „auch“ kann dabei wiederholt zum Kommentieren verwendet werden.

„INTERAKTIONSSTEUERENDE AUSSAGEN VERWENDEN“ (ENTDECKE DIE KRAFT DER SPRACHE MIT DEM MINSPEAK-ZIELVOKABULAR LB4 H)

Lassen Sie Ihren Nutzer die Wirksamkeit verschiedener interaktionssteuernder Äußerungen wie beispielsweise „mehr“, „genug“, „nochmal“ und „auch“ in zahlreichen Alltagssituationen erleben.

PRD-IDEEN DES MONATS

auch

Und du?

Dieses Kennenlernspiel vermittelt einige Vorlieben und Lebensgewohnheiten der Mitspieler. Entdecken Sie persönliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten und werden Sie neugierig aufeinander.

DIESE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:

- Handpuppe

DIESE PRD-PRODUKTE KÖNNEN EINGESETZT WERDEN:

- 1 oder 2 sprechende Tasten (z.B. BIGmack oder Step-by-Step)
- GoTalk9+, GoTalk20+ oder SuperTalker
- Minspeak-Anwendungsprogramme „Quasselkiste 45 / 60“ oder „Wortstrategie 84“
- Anwendungsprogramme „MetaChat“ oder „LoGoFoXX 50“

DAS GEHÖRT ZUR VORBEREITUNG:

- Beim Einsatz sprechender Tasten kennzeichnen Sie die Geräte mit Symbolen und nehmen die entsprechenden Aussagen auf.
- Zur Benutzung des GoTalks bzw. SuperTalkers verwenden Sie das beigelegte Deckblatt. Besprechen Sie das Gerät gemäß den Vorschlägen.
- Verwendet Ihr Talkerbenutzer ein Anwendungsprogramm, drucken Sie die Datei mit den Sequenzen des entsprechenden Programms aus.
- Sollte das Anwendungsprogramm „Quasselkiste 45 V2.0“ genutzt werden, speichern Sie die Wörter „bisschen“ unter der Ikonensequenz AMPEL-MAUS und „sehr“ unter der Kombination „DINO-IDEE“ hinzu.

JETZT KANN ES LOSGEHEN!

- Die Handpuppe stellt sich in der Gruppe vor und erzählt von sich (z.B.: „ich habe einen Bruder“, „ich mag Katzen“, „ich esse gerne Eis“). Diese Vorstellung kann durch einen erwachsenen Spielleiter erfolgen oder stellvertretend durch einen Nutzer einer sprechenden Taste, auf der die Mitteilungen schrittweise aufgenommen worden sind.
- Nach jeweils einer Äußerung dürfen die Mitspieler kommentieren, ob und in wieweit das Gesagte auf sie zutrifft oder nicht.

SO KANN ES WEITERGEHEN:

Vermitteln Sie den Einsatz des Wortes „auch“ ebenfalls in anderen Spiel- und Alltagssituationen. Weitere Ideen finden Sie in dieser Datei auf Seite 2.

Die „PRD-Ideen des Monats“ sind ein kostenloser Service der Prentke Romich GmbH. Nutzung auf eigene Gefahr. Die Prentke Romich GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die aus der Befolgung der hier gemachten Angaben resultieren könnten. Das Ein- bzw. Austragen in den Newsletter erfolgt unter www.prentke-romich.de.

Prentke Romich GmbH
Elektronische Kommunikationshilfen
Goethestr. 31
34119 Kassel
Tel. (0561) 78559-0
Fax (0561) 78559-29
E-Mail info@prentke-romich.de
Web www.prentke-romich.de




Tastensymbol für eine sprechende Taste




Beispieläußerungen:
Ich habe einen Bruder.
Ich mag Hunde.
Ich habe eine Katze.
Ich esse gerne Eis.
Ich esse gerne Äpfel.
Ich wohne in ... (*ergänzen*)
Ich wohne auf dem
Bauernhof.
Ich male gerne.

Tastensymbole für zwei sprechende Tasten

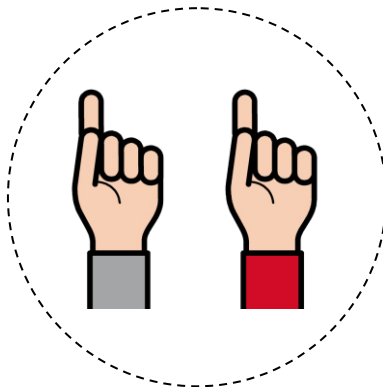



ich auch

ich nicht


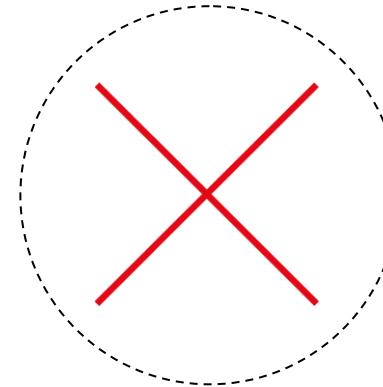


Feld 1: „ich auch“

Feld 2: „ich nicht“

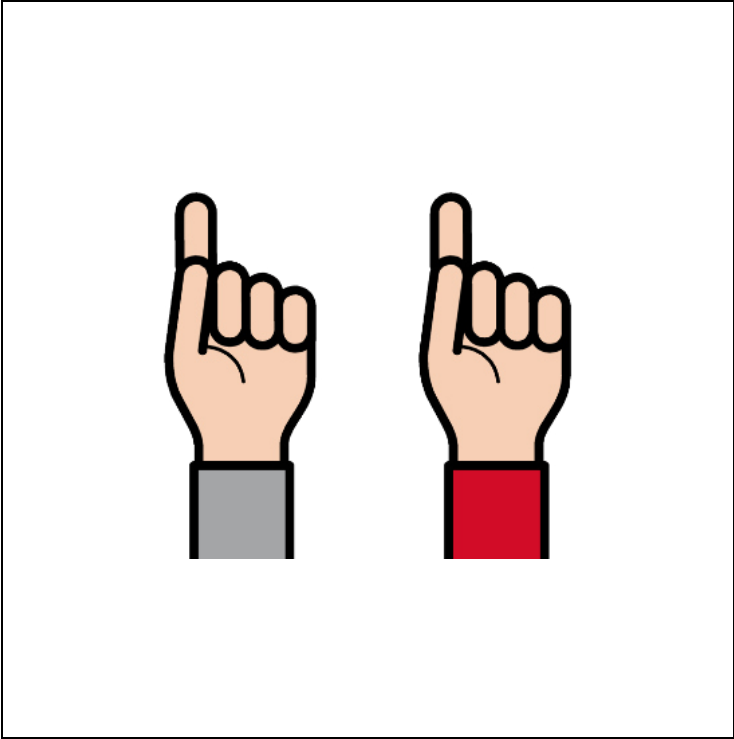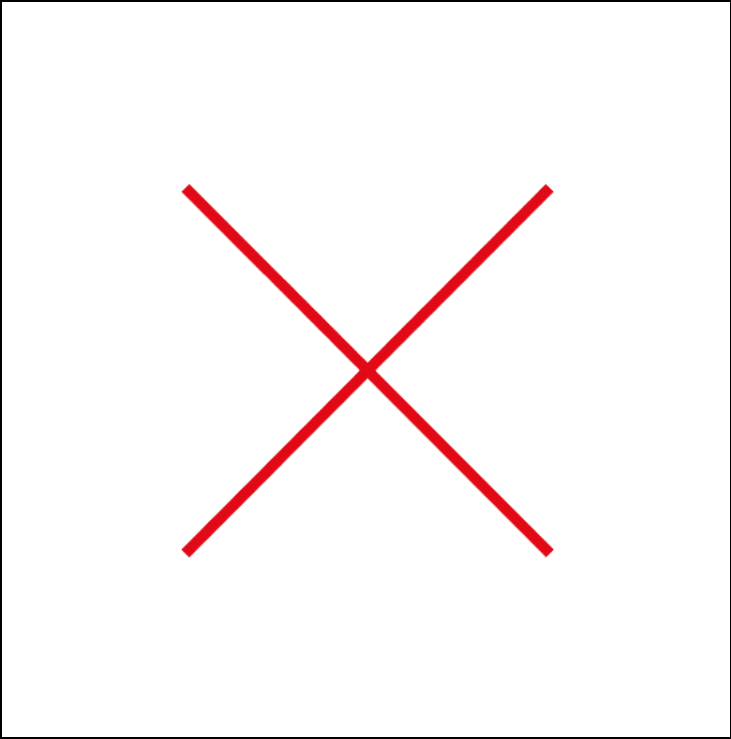SuperTalker		© Prentke Romich GmbH 2016	Symbole: Annette Kitzinger
			
			
EBENE 	Und du?	TASTEN 	



Feld 1: „ich auch“
 Feld 2: -
 Feld 3: -
 Feld 4: „ich nicht“
 Feld 5: -
 Feld 6: „toll“
 Feld 7: „doof“
 Feld 8: -

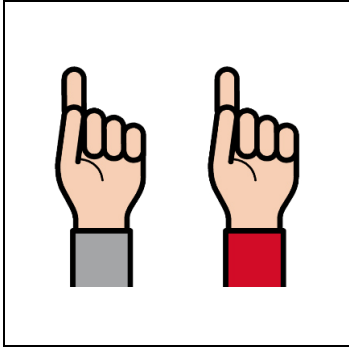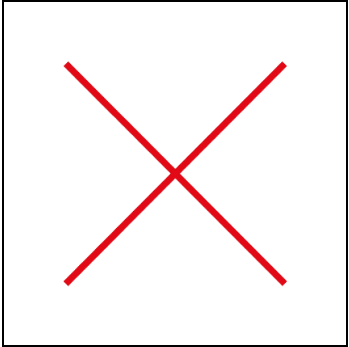		SuperTalker	© Prentke Romich GmbH 2016	Symbole: Annette Kitzing
				
				
EBENE		Und du?	TASTEN	

individuelles
Kernvokabular


individuelles
Kernvokabular

individuelles
Kernvokabular

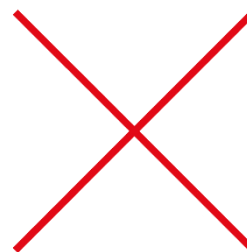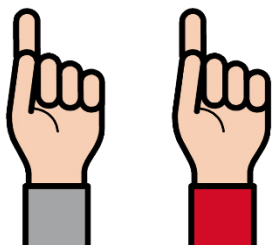

ich auch

ich nicht

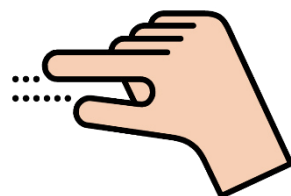

ein bisschen

sehr

i



toll

doof

individuelles
Kernvokabular

individuelles
Kernvokabular

individuelles
Kernvokabular

individuelles
Kernvokabular

individuelles
Kernvokabular



ich auch

ich nicht



ein bisschen


sehr

toll



doof

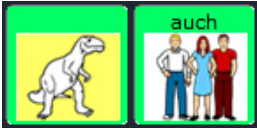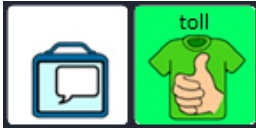

auch  QK45 V2.0 2016.09	nicht  QK45 V2.0 2016.09	toll  QK45 V2.0 2016.09	doof  QK45 V2.0 2016.09
sehr  QK45 V2.0 2016.09	bisschen  QK45 V2.0 2016.09		

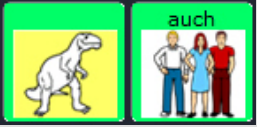
ich 	auch 	QK45 V2.0 2016.09
--	---	--------------------------

ich 	nicht 	QK45 V2.0 2016.09
--	--	--------------------------

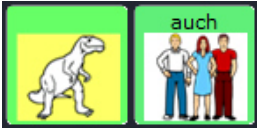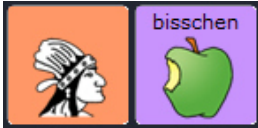auch  QK60 2016.09	nicht  QK60 2016.09	toll  QK60 2016.09	doof  QK60 2016.09
sehr  QK60 2016.09	bisschen  QK60 2016.09		

ich 	ich 	auch 	QK60 2016.09
--	--	---	--------------

ich 	ich 	nicht 	QK60 2016.09
--	--	--	--------------

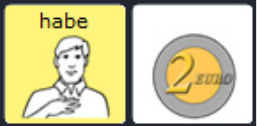habe 	ich 	ich 	auch 	QK60 2016.09
---	--	--	---	--------------

habe



ich



nicht



QK60 2016.09


mag



ich



auch

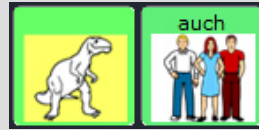

QK60 2016.09

mag





ich



nicht




QK60 2016.09

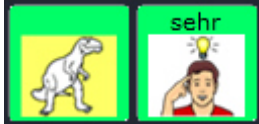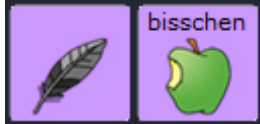
auch  WS84 2016.09	nicht  WS84 2016.09	toll  WS84 2016.09	doof  WS84 2016.09
sehr  WS84 2016.09	bisschen  WS84 2016.09		

ich		ich		auch		WS84 2016.09
-----	---	-----	---	------	---	--------------

ich		ich		nicht		WS84 2016.09
-----	---	-----	---	-------	---	--------------

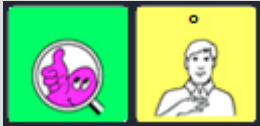habe		ich		auch		WS84 2016.09
------	---	-----	---	------	---	--------------

habe

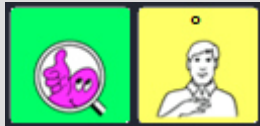

ich




nicht



WS84 2016.09

mag

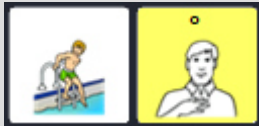

ich




auch



WS84 2016.09


mag

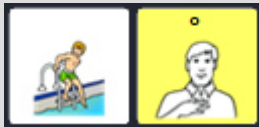


ich



nicht

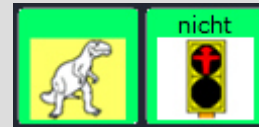



WS84 2016.09

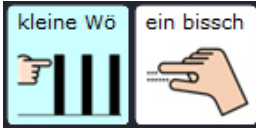auch  METACHAT 2016.09	nicht  METACHAT 2016.09	toll  METACHAT 2016.09	doof  METACHAT 2016.09
sehr  METACHAT 2016.09	ein bisschen  METACHAT 2016.09		




ich 	auch 	METACHAT 2016.09
--	---	------------------

ich 	nicht 	METACHAT 2016.09
--	--	------------------

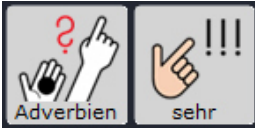
auch  LGF50 2016.09	nicht  LGF50 2016.09	toll  LGF50 2016.09	doof  LGF50 2016.09
sehr  LGF50 2016.09	bisschen  LGF50 2016.09		

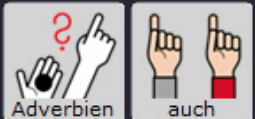ich   auch  LGF50 2016.09

ich   nicht  LGF50 2016.09

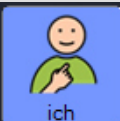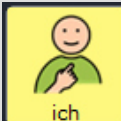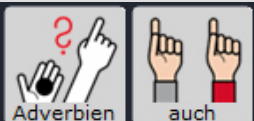habe    ich   auch  LGF50 2016.09

habe

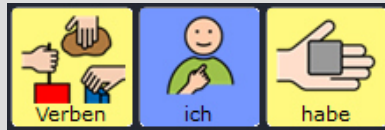

ich



nicht



LGF50 2016.09

mag



ich



auch



LGF50 2016.09

mag



ich



nicht



LGF50 2016.09