


PRD-WÖRTER DES MONATS

Hallo – Guten Morgen


METACOM-SYMBOL



QUASSELKISTE 45 V2.0

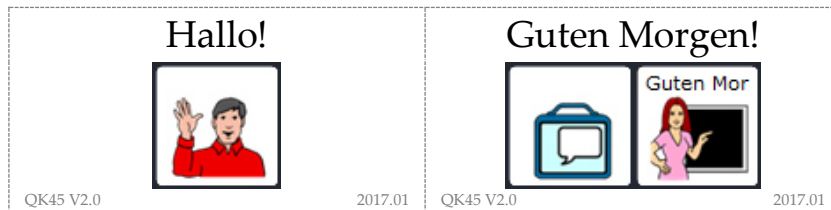

QUASSELKISTE 60 NEU

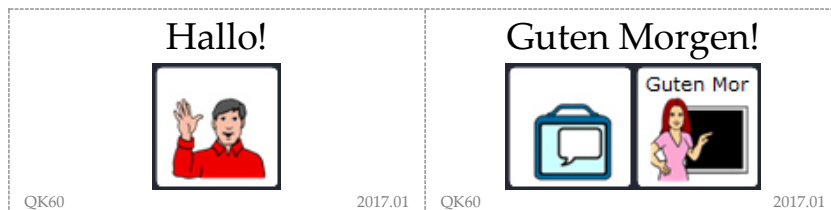


WORTSTRATEGIE 84 NEU



METACHAT



LOGOFOXX 50

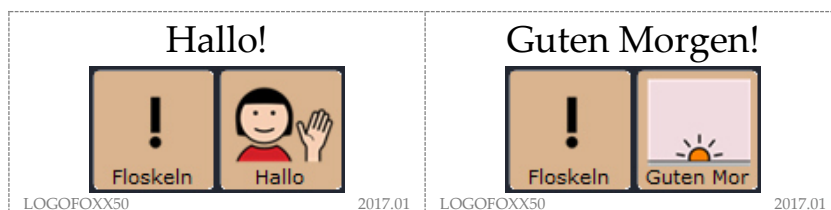

PRD-WÖRTER DES MONATS

Hallo – Guten Morgen

„BEGRÜßUNGSSPIEL“ (BEST OF PRD-IDEEN DES MONATS KAPITEL 1 TIPP 1)

Ergänzen Sie die vorgeschlagenen Begrüßungen „Hände schütteln“, „winken“, „sich verbeugen“ etc. durch verschiedene Floskeln wie „Hallo!“, „Guten Morgen!“ oder „Guten Tag!“.

„ICH MUSS NOCH WARTEN“ (BEST OF PRD-IDEEN DES MONATS KAPITEL 7 TIPP 2)

Wir stellen Ihnen das Bilderbuch „fünfter sein“ von Ernst Jandl und Norman Junge vor. In diesem Lese-projekt können verschiedene Begrüßungsfloskeln mehrfach eingesetzt werden.

„BOTENGÄNGE ÜBERNEHMEN“ (ENTDECKE DIE KRAFT DER SPRACHE MIT EINFACHEN SPRACHAUSGABEBEGERÄTEN UND DEM MINSPEAK-ZIELVOKABULAR LB4 B/D)

Bei Botengängen können die wichtigen sozialen Umgangsformen begrüßen und verabschieden in einer natürlichen Situation geübt werden. Lassen Sie Aufträge zunächst in gewohnten Umgebungen (Kindergarten, Schule) durchführen, später in Alltagssituationen (Bäcker, Metzger, Markt).

„SOZIALE UMGANGSFORMEN“ (ENTDECKE DIE KRAFT DER SPRACHE MIT EINFACHEN SPRACHAUSGABEBEGERÄTEN UND DEM MINSPEAK-ZIELVOKABULAR LB5 A)

In diesem Lernbereich soll vermittelt werden, dass und wie soziale Umgangsformen das Miteinander beeinflussen.

„MIT DEN ZAUBERER-SPRÜCHEN UND FLOSKELN EXPERIMENTIEREN“ (ENTDECKE DIE KRAFT DER SPRACHE MIT DEM MINSPEAK-ZIELVOKABULAR LB2 A)

Im spielerischen Umgang mit den komplexen Kommunikationshilfen entdecken die Talkernutzer, dass unter den Ikonen ZAUBERER und TALKER ganze Sätze und Floskeln abgespeichert sind.

„ROLLENSPIEL EINKAUFEN“ (ENTDECKE DIE KRAFT DER SPRACHE MIT EINFACHEN SPRACHAUSGABEBEGERÄTEN LB4 C/D)

Rollenspiele eignen sich gut, um verschiedene Floskeln, die ein höfliches Miteinander ermöglichen, spielerisch zu erlernen.

PRD-IDEEN DES MONATS

Hallo – Guten Morgen

Ich grüße dich!

Bei diesem Bewegungsspiel geht es um das Erlernen verschiedener Begrüßungsfloskeln. Dieses Spiel eignet sich gut für den Einsatz im Morgenkreis.

DIESE PRD-PRODUKTE KÖNNEN EINGESETZT WERDEN:

- 2 sprechende Tasten (z.B. BIGmack oder Step-by-Step)
- GoTalk9+, GoTalk20+ oder SuperTalker
- Minspeak-Anwendungsprogramme „Quasselkiste 45 / 60“ oder „Wortstrategie 84“
- Anwendungsprogramme „MetaChat“ oder „LoGoFoXX 50“

DAS GEHÖRT ZUR VORBEREITUNG:

- Beim Einsatz sprechender Tasten kennzeichnen Sie die Geräte mit Symbolen und nehmen die entsprechenden Aussagen auf.
- Zur Benutzung des GoTalks bzw. SuperTalkers verwenden Sie das beigelegte Deckblatt. Besprechen Sie das Gerät gemäß den Vorschlägen.
- Auf dem GoTalk20+ können bei Bedarf Fotos der anderen Mitspieler ergänzt werden.
- Verwendet Ihr Talkerbenutzer ein Anwendungsprogramm, drucken Sie die Datei mit den Sequenzen des entsprechenden Programms aus.

JETZT KANN ES LOSGEHEN!

- Alle Teilnehmer setzen sich in einen Kreis. Legen Sie fest, welcher Mitspieler beginnen darf.
- Dieser bewegt sich innerhalb des Stuhlkreises und begrüßt einen ausgewählten Mitspieler mit einer auf seiner Kommunikationshilfe abgespeicherten Äußerung („Hallo!“, „Guten Morgen!“, „Guten Tag!“).
- Anschließend können auch die übrigen Kommentare zum Small Talk eingesetzt werden.
- Anschließend werden die Rollen getauscht und der soeben begrüßte Spieler ist an der Reihe.
- Variieren Sie den Spielablauf, indem Sie auch andere Begrüßungsfloskeln, wie „Hi!“, „Moin, moin!“, „Servus“ oder „Gib mir fünf!“ einsetzen.
- Wie kann man eine Begrüßung durch Körpersprache unterstützen?
- Sobald alle Mitspieler begrüßt worden sind, kann das Spiel beendet werden.

SO KANN ES WEITERGEHEN:


Vermitteln Sie den Einsatz der Wörter „Hallo!“ und „Guten Morgen!“ ebenfalls in anderen Spiel- und Alltagssituationen. Weitere Ideen finden Sie in dieser Datei auf Seite 2.

Die „PRD-Ideen des Monats“ sind ein kostenloser Service der Prentke Romich GmbH. Nutzung auf eigene Gefahr. Die Prentke Romich GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die aus der Befolgung der hier gemachten Angaben resultieren könnten. Das Ein- bzw. Austragen in den Newsletter erfolgt unter www.prentke-romich.de.

Prentke Romich GmbH
Elektronische Kommunikationshilfen
Goethestr. 31
34119 Kassel
Tel. (0561) 78559-0
Fax (0561) 78559-29
E-Mail info@prentke-romich.de
Web www.prentke-romich.de




Tastensymbole für zwei sprechende Tasten

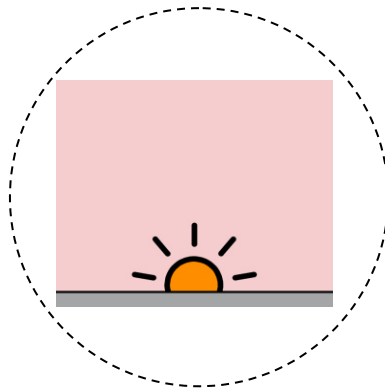


Guten Morgen!

Ich wünsche dir
einen schönen Tag!

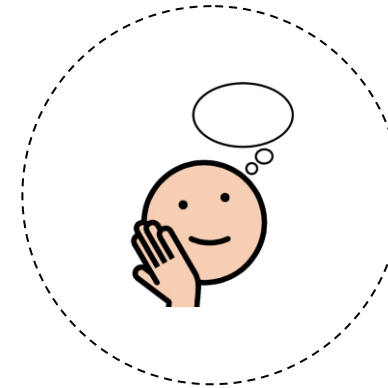

Feld 1: „Guten Morgen!“

Feld 2: „Ich wünsche dir einen schönen Tag!“

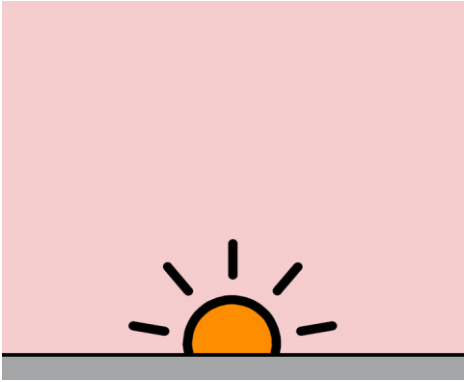SuperTalker		© Prentke Romich GmbH 2017	Symbole: Annette Kitzinger
			
EBENE ○	Ich grüße dich!	TASTEN	②

Feld 1: „Hallo!“

Feld 2: „Guten Morgen!“

Feld 3: „Guten Tag!“

Feld 4: -

Feld 5: -

Feld 6: -

Feld 7: „Schön, dass du da bist!“



Feld 8: „Ich wünsche dir einen schönen Tag!“

		SuperTalker	© Prentke Romich GmbH 2017	Symbole: Annette Kitzinger
				
				
EBENE		Ich grüße dich!	TASTEN	
			8	

*individuelles
Kernvokabular*

*individuelles
Kernvokabular*

*individuelles
Kernvokabular*

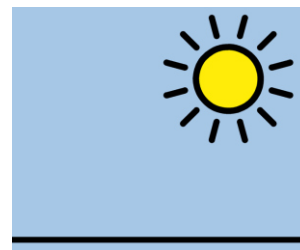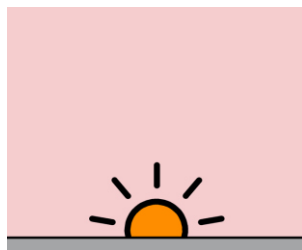

Hallo!

Guten Morgen!

Guten Tag!



Schön, dass du da bist!

Ich wünsche dir einen
schönen Tag!



individuelles
Kernvokabular

individuelles
Kernvokabular

individuelles
Kernvokabular

individuelles
Kernvokabular

individuelles
Kernvokabular

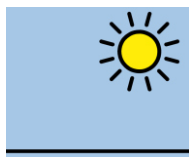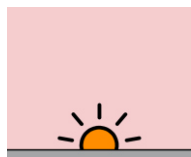

Hallo!



Guten Morgen!


Guten Tag!





Schön, dass du da bist!



Ich wünsche dir einen schönen Tag!

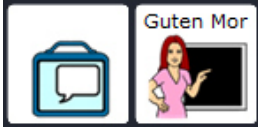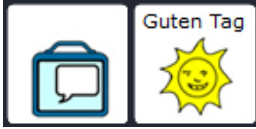Hallo!  QK45 V2.0 2017.01	Guten Morgen!  QK45 V2.0 2017.01	Guten Tag!  QK45 V2.0 2017.01	
<i>Namen männlich</i>  QK45 V2.0 2017.01	<i>Namen weiblich</i>  QK45 V2.0 2017.01		


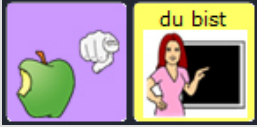
du bist		da		- das ist		schön		QK45 V2.0 2017.01
---------	---	----	---	-----------	---	-------	---	-------------------

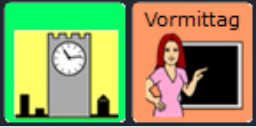
einen		schön		Vormittag		QK45 V2.0 2017.01
-------	--	-------	--	-----------	--	-------------------

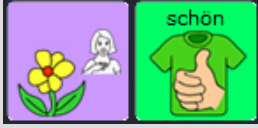einen		schön		Nachmittag		QK45 V2.0 2017.01
-------	---	-------	---	------------	---	-------------------

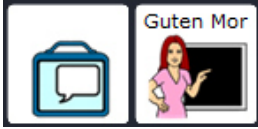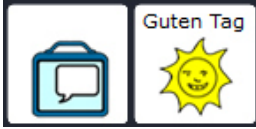Hallo!  QK60 2017.01	Guten Morgen!  QK60 2017.01	Guten Tag!  QK60 2017.01	
<i>Namen männlich</i>  QK60 2017.01	<i>Namen weiblich</i>  QK60 2017.01		

du bist			da			- das		ist			schön			QK60 2017.01
---------	---	---	----	---	---	-------	---	-----	---	---	-------	---	---	--------------

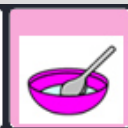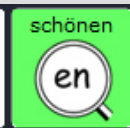ich			wünsche				einen			schönen			QK60 2017.01
Tag													

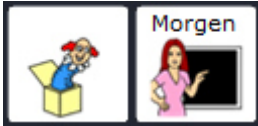Hallo!  WS84 2017.01	Guten Morgen!  WS84 2017.01	Guten Tag!  WS84 2017.01	
<i>Namen männlich</i>  WS84 2017.01	<i>Namen weiblich</i>  WS84 2017.01		

du bist			da			- das		ist			schön			WS84 2017.01
---------	---	---	----	---	---	-------	---	-----	---	---	-------	---	---	--------------

ich			wünsche				einen			schönen			
Tag													

WS84 2017.01

Hallo!



METACHAT

2017.01

Guten Morgen!



METACHAT

2017.01

Guten Tag!



METACHAT

2017.01

Leute




METACHAT

2017.01

du bist



da

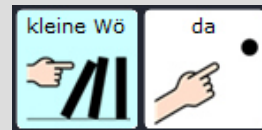

- das ist schön




METACHAT 2017.01


ich wünsche



einen

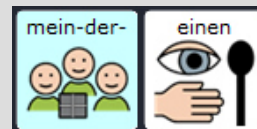

schön

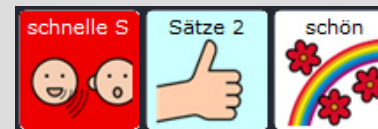


Tag



METACHAT 2017.01

Hallo!  Floskeln Hallo LGF50 2017.01	Guten Morgen!  Floskeln Guten Mor LGF50 2017.01	Guten Tag!  Floskeln Guten Tag LGF50 2017.01	Namen  LGF50 2017.01
--	--	--	---

du bist  du  du bist	da  Adverbien  da - das ist schön	 Floskeln  das ist  schön LGF50 2017.01
---	---	--

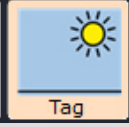ich wünsche  ich  Verben  ich wünsch	einen  ein  (e)n	schönen  Adjektive  schön  (e)n	Tag   Tag LGF50 2017.01
---	--	--	--