



PRD-WÖRTER DES MONATS

links – rechts – oben – unten


METACOM-SYMBOL

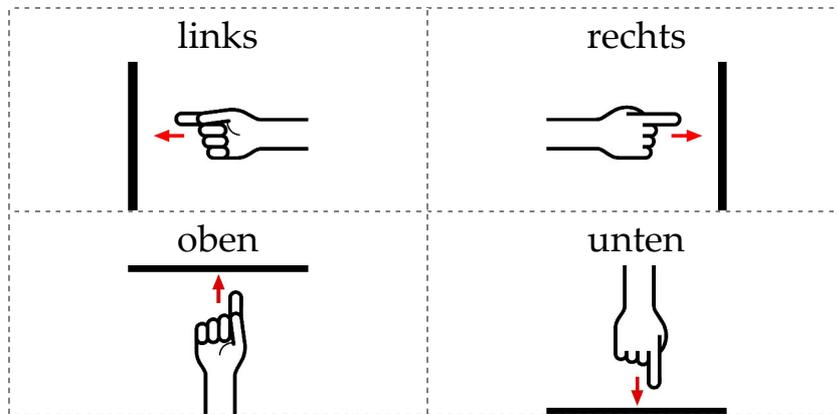

QUASSELKISTE 45 V2.0


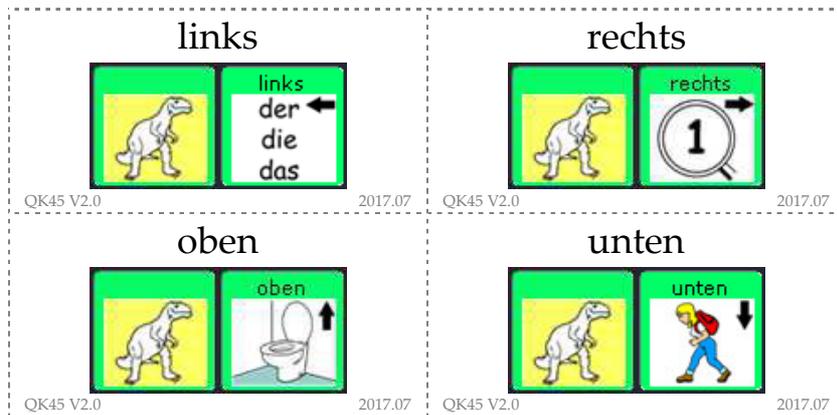


QUASSELKISTE 60 NEU

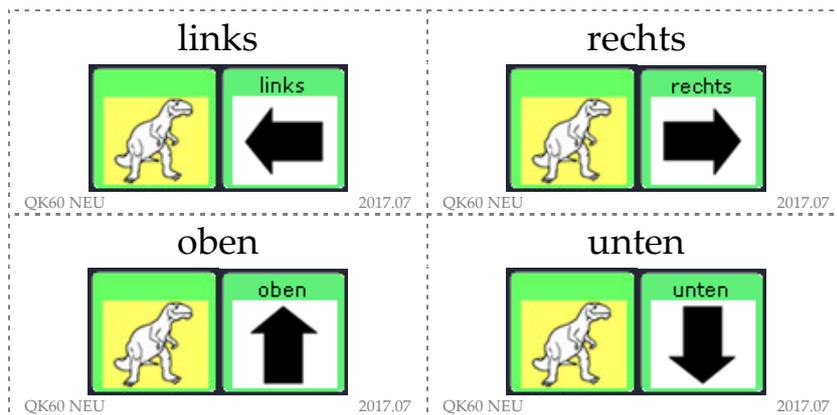

PRD-WÖRTER DES MONATS

WORTSTRATEGIE 84 NEU
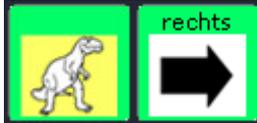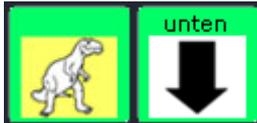
<p>links</p>  <p>WS84 NEU 2017.07</p>	<p>rechts</p>  <p>WS84 NEU 2017.07</p>
<p>oben</p>  <p>WS84 NEU 2017.07</p>	<p>unten</p>  <p>WS84 NEU 2017.07</p>

LOGOFOXX 50

<p>links</p>  <p>LGF50 2017.07</p>	<p>rechts</p>  <p>LGF50 2017.07</p>
<p>oben</p>  <p>LGF50 2017.07</p>	<p>unten</p>  <p>LGF50 2017.07</p>

LOGOFOXX 60

<p>links</p>  <p>LGF60 2017.07</p>	<p>rechts</p>  <p>LGF60 2017.07</p>
<p>oben</p>  <p>LGF60 2017.07</p>	<p>unten</p>  <p>LGF60 2017.07</p>

PRD-WÖRTER DES MONATS

links – rechts – oben – unten

MASSAGE

Lassen Sie Ihren Benutzer während einer Rückenmassage immer wieder bestimmen, wo massiert werden soll: „Oben“ oder besser „unten“? Mehr „links“ oder doch mehr „rechts“?

SEIFENBLASEN

Beim Seifenblasenpusten kann der Benutzer mit den Wörtern „links“, „rechts“, „oben“ und „unten“ Einfluss auf die Aktion nehmen.

HÄUSER ERKUNDEN

Beim gemeinsamen Erkunden eines Gebäudes entscheidet der Benutzer, wohin Sie als nächstes gehen: Biegen Sie „links“ oder „rechts“ ab? Fahren Sie mit dem Fahrstuhl nach „unten“ oder „oben“?

BEIM BASTELN

Der Benutzer entscheidet beim Basteln einer Collage, wohin ein Motiv geklebt werden soll.

„WEIHNACHTSBAUM SCHMÜCKEN“ (PRD-IDEE DEZEMBER 2013)

Mit Hilfe der Wörter „oben“, „unten“, „rechts“ und „links“ hilft Ihr Benutzer beim Schmücken des Weihnachtsbaumes.

„FRÜHLINGSBILD“ (PRD-IDEE APRIL 2014)

Lebt ein Maulwurf „oben“ oder „unten“? Kann man Wolken „oben“ oder „unten“ sehen? Basteln Sie zusammen mit Ihrem Benutzer ein Frühlingbild und lassen Sie ihn entscheiden, welche Positionen die verschiedenen Tiere, Pflanzen und Fahrzeuge einnehmen.

„DOSENWERFEN“ (PRD-IDEE JULI 2016)

Bei diesem Wettspiel entscheidet die gegnerische Mannschaft, ob auf die „linke“ oder „rechte“ Dosenpyramide geworfen werden soll.

„OSTEREISUCHE MIT ZIELVOKABULAR“ (BEST OF PRD-IDEEN DES MONATS KAPITEL 6 TIPP 1)

Der Benutzer kann u.a. mit den Wörtern „links“, „rechts“, „oben“ und „unten“ entscheiden, wo als nächstes nach Ostereiern gesucht werden soll.

„TOPFSCHLAGEN“ (BEST OF PRD-IDEEN DES MONATS KAPITEL 10 TIPP 2)

Die Mitspieler können beim Topfschlagen Hinweise geben, wo der Topf steht bzw. wohin sich die Person mit verbundenen Augen wenden muss.

„BILD MALEN“ (ENTDECKE DIE KRAFT DER SPRACHE MIT DEM MINSPEAK-ZIELVOKABULAR LB2 E)

Gestalten Sie mit Ihrem Benutzer ein Kunstwerk ganz nach seinen Wünschen und lassen Sie ihn die Wirksamkeit seiner Äußerungen, so auch der Wörter „links“, „rechts“, „oben“ und „unten“ erleben.

PRD-IDEEN DES MONATS

links – rechts – oben – unten

Grimassen schneiden

Grimassen schneiden macht Spaß. Noch mehr Spaß macht es, andere dazu zu animieren!

DIESE PRD-PRODUKTE KÖNNEN EINGESETZT WERDEN:

- 1-2 sprechende Tasten (z.B. Step-by-Step)
- GoTalk9+, GoTalk20+ oder SuperTalker
- Minspeak-Anwendungsprogramme „Quasselkiste 45 / 60“ oder „Wortstrategie 84“
- Anwendungsprogramme „LoGoFoXX 50“ oder „LoGoFoXX 60“

DAS GEHÖRT ZUR VORBEREITUNG:

- Beim Einsatz sprechender Tasten kennzeichnen Sie die Geräte mit Symbolen und nehmen die entsprechenden Aussagen auf.
- Zur Benutzung des GoTalks bzw. SuperTalkers verwenden Sie das beigegefügte Deckblatt. Besprechen Sie das Gerät gemäß den Vorschlägen.
- Verwendet Ihr Talkerbenutzer ein Anwendungsprogramm, drucken Sie die Datei mit den Sequenzen des entsprechenden Programms aus.

JETZT KANN ES LOSGEHEN!

- Diese Aktivität kann zu zweit an einem beliebigen Ort stattfinden (z.B. beim Warten auf den Bus), aber auch als Gruppenaktivität „Gesichtsgymnastik“ z.B. im Morgenkreis oder im Sportunterricht.
- Der Talkerbenutzer entscheidet, welche Grimasse geschnitten werden soll: z.B. „Mund nach rechts“. Sein Gegenüber versucht dies entsprechend umzusetzen.
- Fortgeschrittene bekommen gleich mehrere Aufträge, z.B. „Augen nach links“ – „Nase nach oben“ – „Mund nach unten“.

SO KANN ES WEITERGEHEN:


Vermitteln Sie den Einsatz der Wörter „links“, „rechts“, „oben“ und „unten“ ebenfalls in anderen Spiel- und Alltagssituationen. Weitere Ideen finden Sie in dieser Datei auf Seite 3.

Die „PRD-Ideen des Monats“ sind ein kostenloser Service der Prentke Romich GmbH. Nutzung auf eigene Gefahr. Die Prentke Romich GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die aus der Befolgung der hier gemachten Angaben resultieren könnten. Das Ein- bzw. Austragen in den Newsletter erfolgt unter www.prentke-romich.de.

Prentke Romich GmbH
Elektronische Kommunikationshilfen
Goethestr. 31
34119 Kassel
Tel. (0561) 78559-0
Fax (0561) 78559-29
E-Mail info@prentke-romich.de
Web www.prentke-romich.de




Tastensymbol für eine sprechende Taste

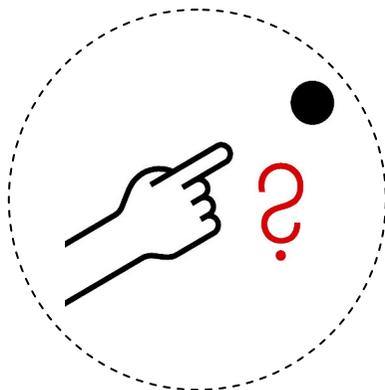


Augen nach oben
Nase nach oben
Mund nach rechts
Augen nach links
Mund nach unten
Nase nach rechts
...

Tastensymbole für zwei sprechende Tasten








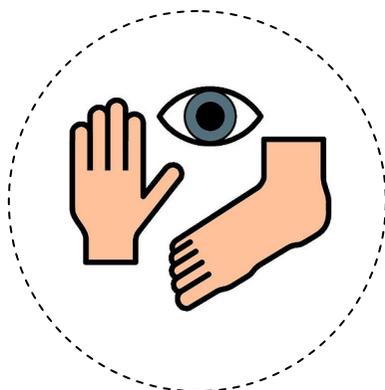


Augen...
Nase...
Mund...


... nach oben
... nach links
... nach unten
... nach rechts

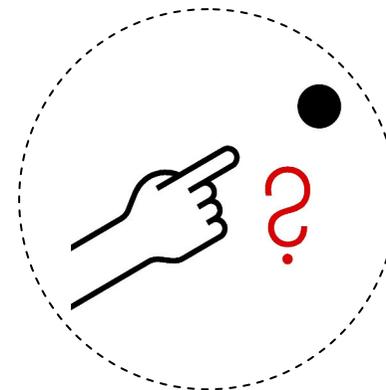


- Feld 1: „Augen“
- Feld 2: „Nase“
- Feld 3: „Mund“
- Feld 4: „nach oben“
- Feld 5: -
- Feld 6: „nach links“
- Feld 7: „nach rechts“
- Feld 8: „nach unten“

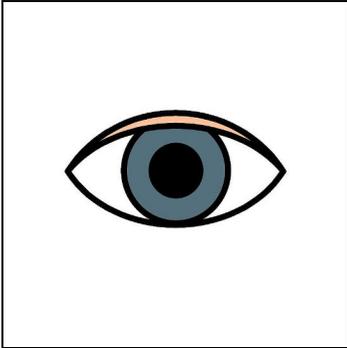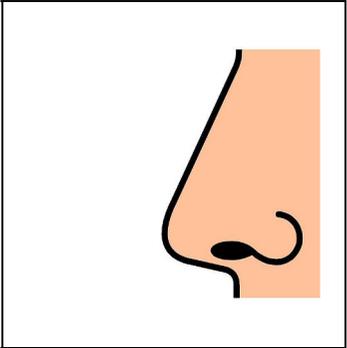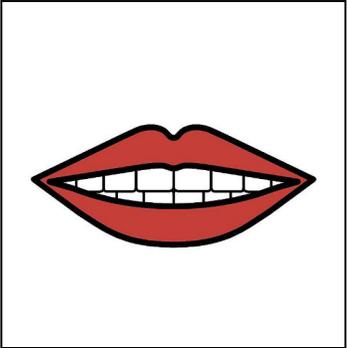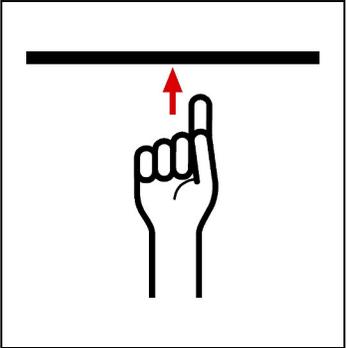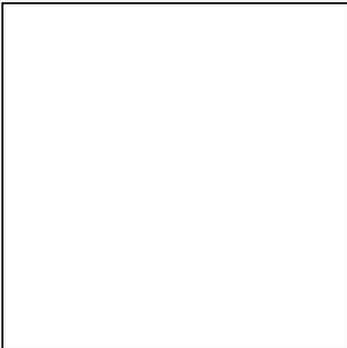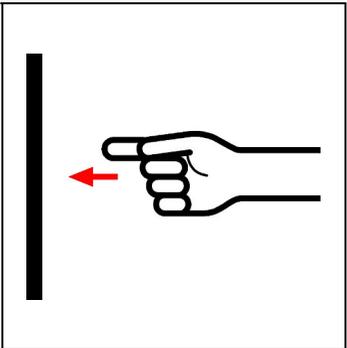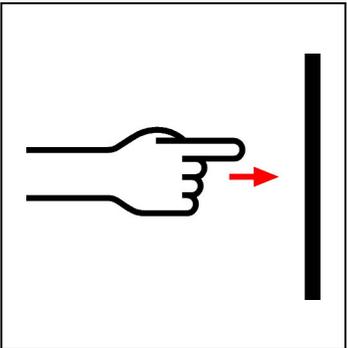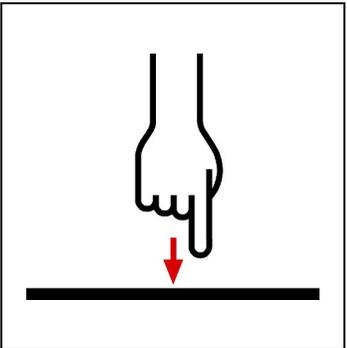	SuperTalker	© Prentke Romich GmbH 2017	Symbole: Annette Kitzingler
			
			
EBENE		Grimassen schneiden	TASTEN
			

individuelles
Kernvokabular

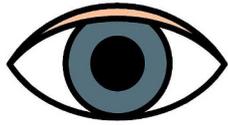

individuelles
Kernvokabular

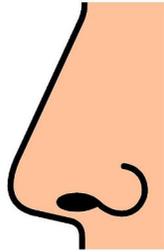


individuelles
Kernvokabular




Augen

Nase


Mund

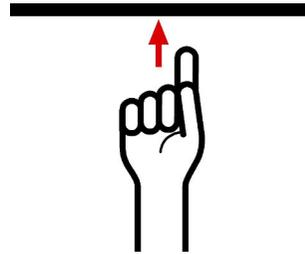


nach oben

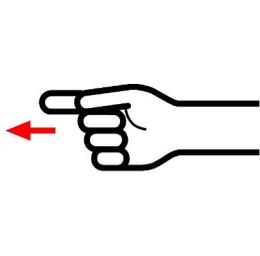

nach links

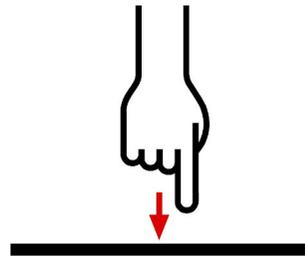

nach unten

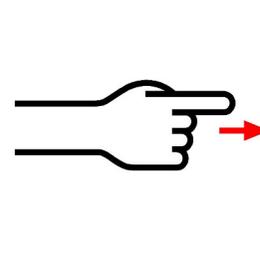

nach rechts


individuelles
Kernvokabular

individuelles
Kernvokabular

individuelles
Kernvokabular

individuelles
Kernvokabular


individuelles
Kernvokabular

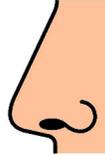


Augen

Nase

Mund

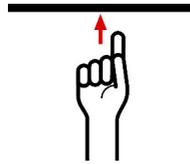


nach oben

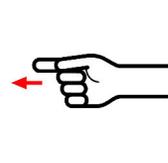

nach links



nach rechts

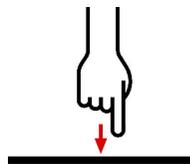

nach unten

Auge



QK45 V2.0

2017.07

Nase



QK45 V2.0

2017.07

Mund



QK45 V2.0

2017.07


nach



QK45 V2.0

2017.07


links

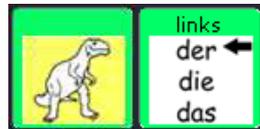

QK45 V2.0

2017.07


rechts

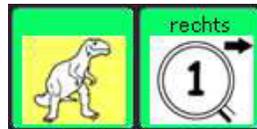

QK45 V2.0

2017.07


oben

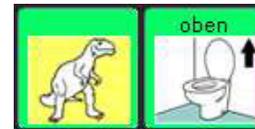

QK45 V2.0

2017.07

unten

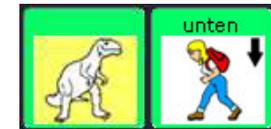

QK45 V2.0

2017.07


Augen



QK60 NEU

2017.07


Nase

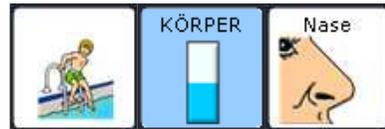

QK60 NEU

2017.07

Mund

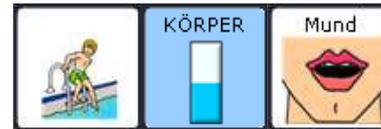

QK60 NEU

2017.07


nach



QK60 NEU

2017.07


links

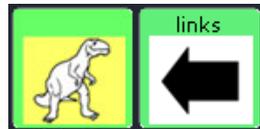

QK60 NEU

2017.07


rechts

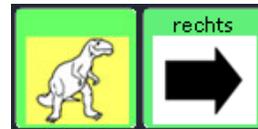

QK60 NEU

2017.07


oben

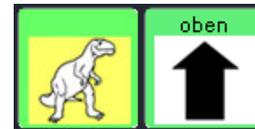

QK60 NEU

2017.07

unten

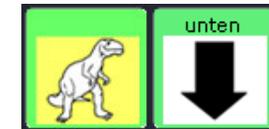

QK60 NEU

2017.07

Augen



WS84 NEU

2017.07

Nase



WS84 NEU

2017.07

Mund



WS84 NEU

2017.07


nach



WS84 NEU

2017.07


links

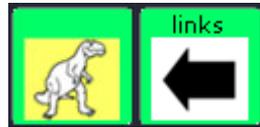

WS84 NEU

2017.07

rechts

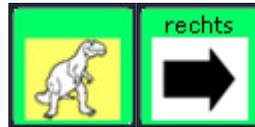

WS84 NEU

2017.07


oben



WS84 NEU



2017.07

unten

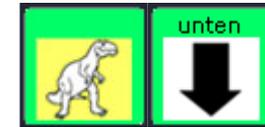

WS84 NEU

2017.07
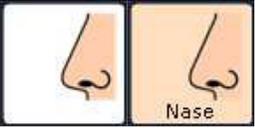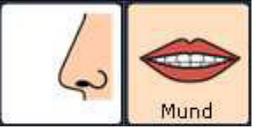
<p style="text-align: center;">Augen</p>  <p>LGF50 2017.07</p>	<p style="text-align: center;">Nase</p>  <p>LGF50 2017.07</p>	<p style="text-align: center;">Mund</p>  <p>LGF50 2017.07</p>	<p style="text-align: center;">nach</p>  <p>LGF50 2017.07</p>
<p style="text-align: center;">links</p>  <p>LGF50 2017.07</p>	<p style="text-align: center;">rechts</p>  <p>LGF50 2017.07</p>	<p style="text-align: center;">oben</p>  <p>LGF50 2017.07</p>	<p style="text-align: center;">unten</p>  <p>LGF50 2017.07</p>


Augen



LGF60

2017.07


Nase

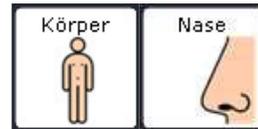

LGF60

2017.07

Mund

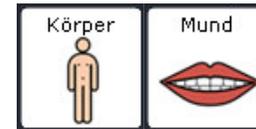

LGF60

2017.07

nach



LGF60

2017.07

links



LGF60

2017.07

rechts



LGF60

2017.07

oben



LGF60

2017.07

unten



LGF60

2017.07