



PRD-WÖRTER DES MONATS

mein – dein


METACOM-SYMBOLE

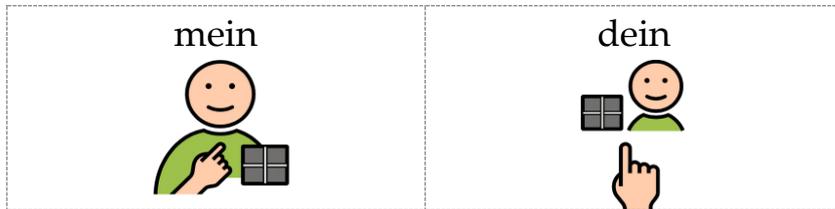


QUASSELKISTE 45 V2.0

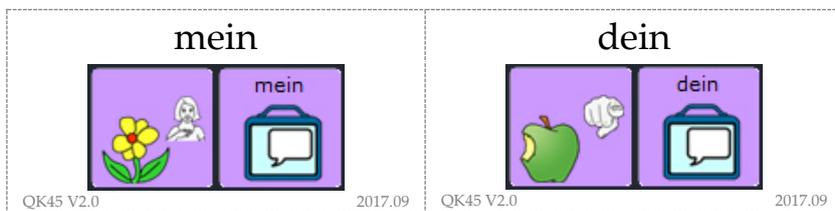


QUASSELKISTE 60 NEU

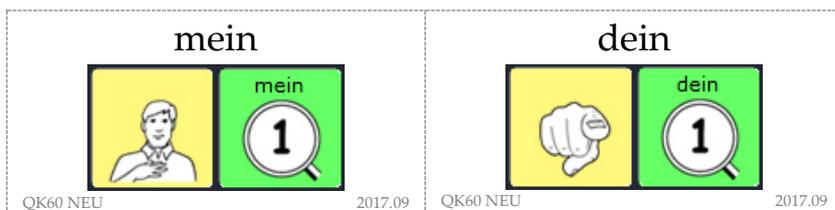


WORTSTRATEGIE 84 NEU

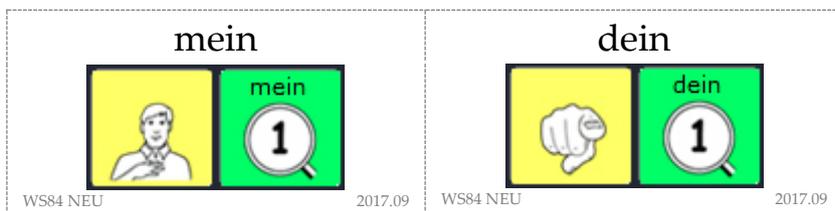

LOGOFOXX 50

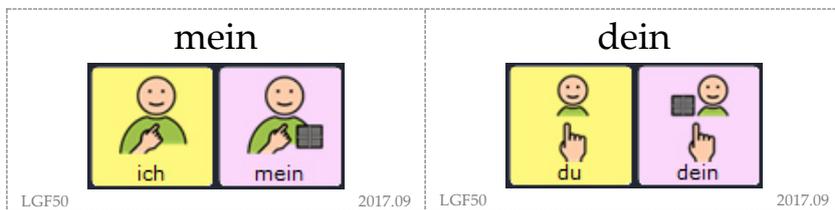

LOGOFOXX 60

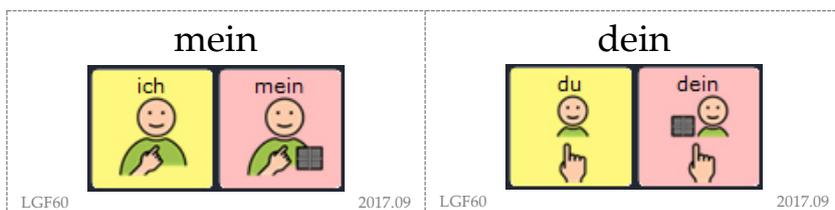

PRD-WÖRTER DES MONATS

mein – dein

GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE FINDEN

Finden Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede, z.B. „mein“ Bruder ist groß, „meine“ Schwester ist klein, „mein“ Haar ist lang, „dein“ Haar ist kurz.

„WO IST MEINE MAMA?“ (PRD-IDEE OKTOBER 2014)

In dieser Idee stellen wir Ihnen das Bilderbuch „Wo ist Mami?“ von Axel Scheffler und Julia Donaldson vor. Der kleine Affe sucht nach seiner Mama ...und findet sie!

„BÜCHER ÜBER MICH UND DICH“ (BEST OF PRD-IDEEN DES MONATS KAPITEL 1 TIPP 4)

Beim Erstellen eines Ich-Buchs und dem gegenseitigen Zeigen der Bücher nutzen die Teilnehmer unter anderem die Wörter „mein“ und „dein“.

„MEIN RECHTER, RECHTER PLATZ IST FREI“ (BEST OF PRD-IDEEN DES MONATS KAPITEL 3 TIPP 1)

Bei diesem bekannten Kinderspiel kann das Zielwort „mein“ eingesetzt werden.

„MEIN SCHLÜSSEL IST WEG!“ (BEST OF PRD-IDEEN DES MONATS KAPITEL 10 TIPP 1)

Der verlorene Schlüssel muss unter Tastenkappen gesucht werden. Bei diesem Rate- und Suchspiel geht es bunt her!

„ICH-INFORMATIONEN“ (ENTDECKE DIE KRAFT DER SPRACHE MIT EINFACHEN SPRACHAUSGABEGERÄTEN LB3 A)

Der Benutzer einer einfachen Hilfe kann etwas über sich erzählen: „mein“ Alter ist..., „mein“ Hobby ist...

„ICH- UND DU-DECKBLATT“ (ENTDECKE DIE KRAFT DER SPRACHE MIT DEM GOTALK20+/GOTALK EXPRESS 32 LB4 E)

Mit Hilfe eines kombinierten Ich- und Du-Deckblatts kann der Benutzer eines GoTalk20+ oder eines GoTalk Express 32 Erfahrungen mit Dialogstrukturen sammeln und hierbei unter anderem die Wörter „mein“ und „dein“ nutzen.

PRD-IDEEN DES MONATS

mein – dein

Guck mal!

Zum Start ins neue Schuljahr haben wir ein kleines Kennenlernspiel vorbereitet. Um erkennen zu können, wer welche Augenfarbe hat, muss man sich tief in die Augen schauen!

DIESE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:

- Je ein Blatt blaues, grünes und braunes Papier

DIESE PRD-PRODUKTE KÖNNEN EINGESETZT WERDEN:

- 1-2 sprechende Tasten (z.B. Step-by-Step)
- GoTalk9+, GoTalk20+ oder SuperTalker
- Minspeak-Anwendungsprogramme „Quasselkiste 45 / 60“ oder „Wortstrategie 84“
- Anwendungsprogramme „LoGoFoXX 50“ oder „LoGoFoXX 60“

DAS GEHÖRT ZUR VORBEREITUNG:

- Beim Einsatz sprechender Tasten kennzeichnen Sie die Geräte mit Symbolen und nehmen die entsprechenden Aussagen auf.
- Zur Benutzung des GoTalks bzw. SuperTalkers verwenden Sie das beigefügte Deckblatt. Besprechen Sie das Gerät gemäß den Vorschlägen.
- Verwendet Ihr Talkerbenutzer ein Anwendungsprogramm, drucken Sie die Datei mit den Sequenzen des entsprechenden Programms aus.
- Legen Sie ein blaues, grünes und braunes Papier mit etwas Abstand in die Mitte des Raumes.

JETZT KANN ES LOSGEHEN!

- Die Spielteilnehmer sitzen in einem Stuhlkreis.
- Der erste Talkerbenutzer sagt, welche Augenfarbe er hat („Meine Augen sind...“) und geht zu dem Papier mit der entsprechenden Farbe.
- Nun sucht sich der Talkerbenutzer einen anderen Teilnehmer aus und benennt dessen Augenfarbe („Deine Augen sind...“). Daraufhin geht dieser ebenfalls zu dem passend farbigen Papier und setzt die Spielaktion entsprechend fort.
- Das Spiel endet, sobald alle an der Reihe waren. Welche Augenfarbe kommt in der Gruppe am häufigsten, welche am seltensten vor?
- Variieren Sie diese Spielidee mit Kleidungsstücken und weiteren Farben.

SO KANN ES WEITERGEHEN:

Vermitteln Sie den Einsatz der Wörter „mein“ und „dein“ ebenfalls in anderen Spiel- und Alltagssituationen. Weitere Ideen finden Sie in dieser Datei auf Seite 2.

Die „PRD-Ideen des Monats“ sind ein kostenloser Service der Prentke Romich GmbH. Nutzung auf eigene Gefahr. Die Prentke Romich GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die aus der Befolgung der hier gemachten Angaben resultieren könnten. Das Ein- bzw. Austragen in den Newsletter erfolgt unter www.prentke-romich.de.

Prentke Romich GmbH

Elektronische Kommunikationshilfen

Goethestr. 31

34119 Kassel


Tel. (0561) 78559-0

Fax (0561) 78559-29

E-Mail info@prentke-romich.de


Web www.prentke-romich.de

Tastensymbol für eine sprechende Taste

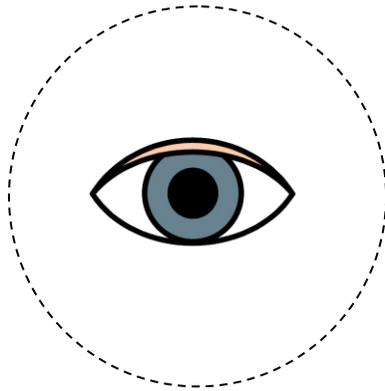


Meine Augen sind
(Farbe ergänzen).
Und deine?

Tastensymbole für zwei sprechende Tasten

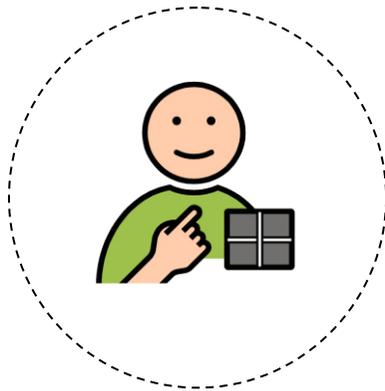

Meine Augen sind
(Farbe ergänzen).

Und deine?

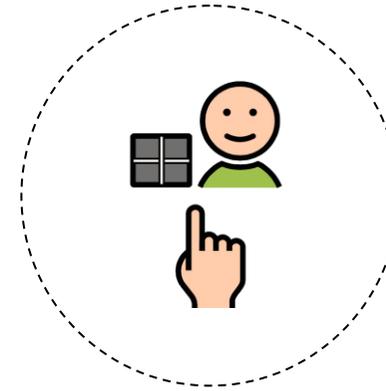

DECKBLATT FÜR „PRD-IDEEN DES MONATS“ SEPTEMBER 2017

Feld 1: „Meine Augen sind ...“

Feld 2: -

Feld 3: „Deine Augen sind ...“






Feld 4: -

Feld 5: -

Feld 6: „blau“

Feld 7: „grün“



Feld 8: „braun“

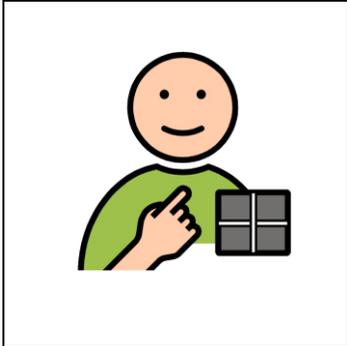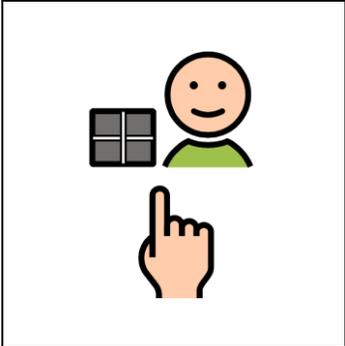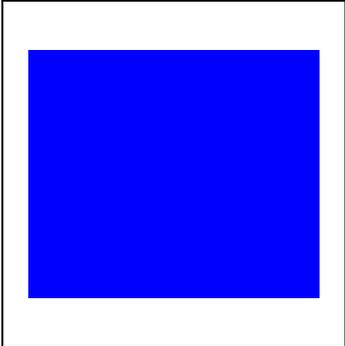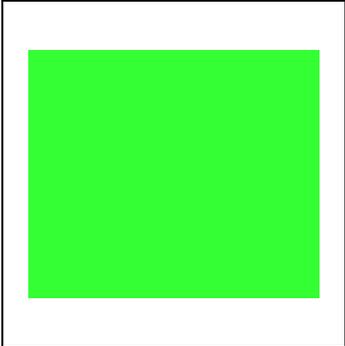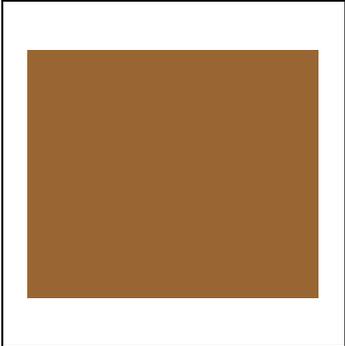	SuperTalker	© Prentke Romich GmbH 2017	Symbole: Annette Kitzinger	
				
				
EBENE		Guck mal!	TASTEN	

*individuelles
Kernvokabular*

*individuelles
Kernvokabular*

*individuelles
Kernvokabular*

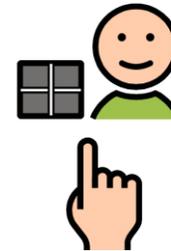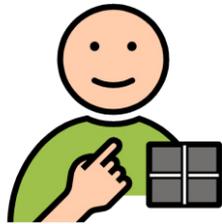

Meine Augen sind...

Deine Augen sind...



blau

grün

braun


individuelles
Kernvokabular

individuelles
Kernvokabular

individuelles
Kernvokabular

individuelles
Kernvokabular

individuelles
Kernvokabular

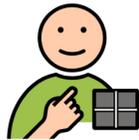

Meine Augen sind ...

Deine Augen sind ...




blau

grün



braun

mein   ist  ...


QK45 V2.0 2017.09

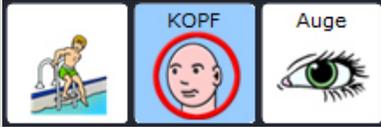dein   ist  ...

QK45 V2.0 2017.09
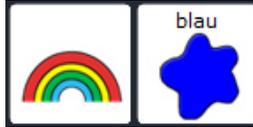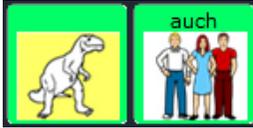
<p>mein</p>  <p>QK45 V2.0 2017.09</p>	<p>dein</p>  <p>QK45 V2.0 2017.09</p>	<p>Auge</p>  <p>QK45 V2.0 2017.09</p>	<p>blau</p>  <p>QK45 V2.0 2017.09</p>
<p>grün</p>  <p>QK45 V2.0 2017.09</p>	<p>braun</p>  <p>QK45 V2.0 2017.09</p>	<p>auch</p>  <p>QK45 V2.0 2017.09</p>	<p>nicht</p>  <p>QK45 V2.0 2017.09</p>


meine   **meine**

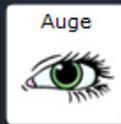Augen   **Auge** 

sind   **sind** ...

QK60 NEU 2017.09

deine   **deine**

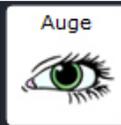Augen   **Auge** 


sind   **sind** ...

QK60 NEU 2017.09


<p>mein</p>   mein	<p>dein</p>   dein	<p>Auge</p>   Auge	<p>blau</p>   blau
QK60 NEU 2017.09	QK60 NEU 2017.09	QK60 NEU 2017.09	QK60 NEU 2017.09
<p>grün</p>   grün	<p>braun</p>   braun	<p>auch</p>   auch	<p>nicht</p>   nicht
QK60 NEU 2017.09	QK60 NEU 2017.09	QK60 NEU 2017.09	QK60 NEU 2017.09

meine   Augen    sind   ...

WS84 NEU 2017.09

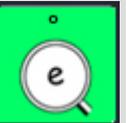deine   Augen    sind   ...

WS84 NEU 2017.09
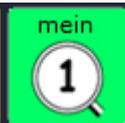
<p>mein</p>   <p>WS84 NEU 2017.09</p>	<p>dein</p>   <p>WS84 NEU 2017.09</p>	<p>Auge</p>   <p>WS84 NEU 2017.09</p>	<p>blau</p>   <p>WS84 NEU 2017.09</p>
<p>grün</p>   <p>WS84 NEU 2017.09</p>	<p>braun</p>   <p>WS84 NEU 2017.09</p>	<p>auch</p>   <p>WS84 NEU 2017.09</p>	<p>nicht</p>   <p>WS84 NEU 2017.09</p>

meine Augen sind ... LGF50 2017.09

deine Augen sind ... LGF50 2017.09

<p>mein</p> <p>LGF50 2017.09</p>	<p>dein</p> <p>LGF50 2017.09</p>	<p>Auge</p> <p>LGF50 2017.09</p>	<p>blau</p> <p>LGF50 2017.09</p>
<p>grün</p> <p>LGF50 2017.09</p>	<p>braun</p> <p>LGF50 2017.09</p>	<p>auch</p> <p>LGF50 2017.09</p>	<p>nicht</p> <p>LGF50 2017.09</p>

meine **Augen** **sind** ... LGF60 2017.09

deine **Augen** **sind** ... LGF60 2017.09

<p>mein</p> <p>LGF60 2017.09</p>	<p>dein</p> <p>LGF60 2017.09</p>	<p>Auge</p> <p>LGF60 2017.09</p>	<p>blau</p> <p>LGF60 2017.09</p>
<p>grün</p> <p>LGF60 2017.09</p>	<p>braun</p> <p>LGF60 2017.09</p>	<p>auch</p> <p>LGF60 2017.09</p>	<p>nicht</p> <p>LGF60 2017.09</p>