


Einführung in die ABC-Programme

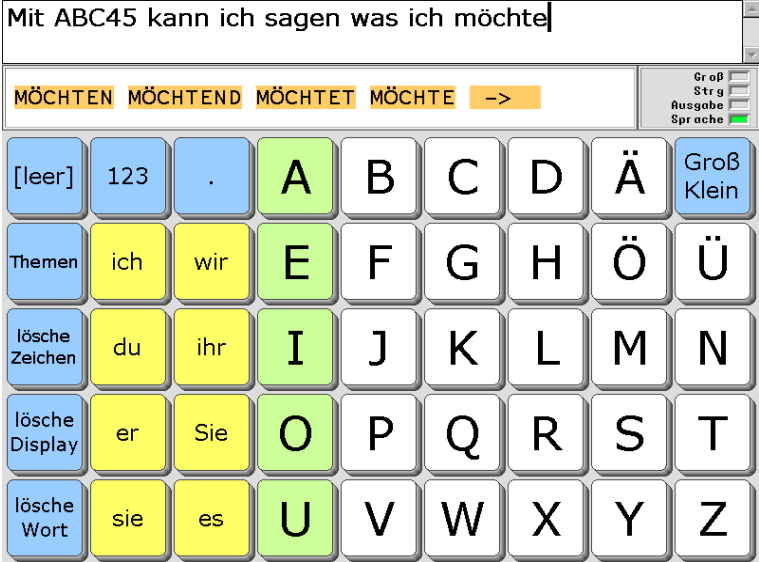

ABC45



ABC60

Hinweise

SmallTalker, XL-Talker, EcoTalker, ABC45 und ABC60 sind Warenzeichen der Prentke Romich GmbH.

Vantage Lite, Vantage, Vanguard, ECO-14, ECO, ECOPoint sind Warenzeichen der Prentke Romich Company.

Minspeak ist ein eingetragenes Warenzeichen der Semantic Compaction Systems.

Deutsche Wortstrategie und Quasselkiste sind Warenzeichen der Semantic Compaction Systems.

„Einführung in die ABC-Programme“ geschrieben von Brunhild Petersen und Jürgen Babst.
Version 3.01 • September 2011

© Prentke Romich GmbH 2008-2011

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden. Prentke Romich GmbH geht damit keinerlei Verpflichtung ein. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Prentke Romich GmbH sind die vollständige oder teilweise Fotokopie und Reproduktion dieses Buches sowie die Übersetzung in andere Sprachen nicht zulässig.

Prentke Romich GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen für diese Unterlagen. Das gilt ohne Einschränkung auch für implizite Garantien auf Marktgängigkeit und Eignung des SmallTalkers, XL-Talkers und des EcoTalkers oder der hierin gemachten Angaben für einen bestimmten Zweck. Auch übernimmt die Prentke Romich GmbH über die gesetzliche Produkthaftung hinaus keine Haftung für irgendwelche Schäden, die sich aus der Anwendung und Nutzung des SmallTalkers, XL-Talkers und des EcoTalkers oder der in diesem Handbuch gemachten Angaben ergeben.

Prentke Romich GmbH

Goethestr. 31

D - 34119 Kassel

Tel. (0561) 78559-0

Fax (0561) 78559-29

E-Mail info@prentke-romich.de

Web <http://www.prentke-romich.de>

Inhaltsverzeichnis

HINWEISE.....	2
WILLKOMMEN BEI DEN ABC-PROGRAMMEN	5
ABC 45	6
DIE SCHRIFT-SEITE	6
GELBE TASTEN.....	7
BLAUE FUNKTIONSTASTEN.....	8
DIE ZEICHEN-SEITE	9
WORTVORHERSAGE	10
DIE THEMEN-SEITEN	11
DIE SEITE SÄTZE.....	12
DIE SEITE FLOSKELN	12
DIE SEITE TELEFON.....	13
DIE SEITE NOTRUF	13
DIE SEITE ZEIT	14
DIE SEITE MONATE.....	14
DIE SEITE ORTE	15
DIE SEITE FAMILIE	15
DIE SEITE NAMEN	16
DIE SEITE LEUTE.....	16
DIE SEITE ESSEN	17
DIE SEITE TRINKEN	17
DIE SEITE KLEIDUNG.....	18
DIE SEITE PFLEGE	18
DIE SEITE KÖRPER.....	19
DIE SEITE MEDIZIN	19
EIGENE ÄNDERUNGEN EINFÜGEN.....	20
SEITEN ÄNDERN	20
AUSSPRACHE KORRIGIEREN.....	25
BESONDERE FUNKTIONEN DES TALKERS.....	26
NOTIZBÜCHER	26
RECHNER.....	27
INFRAROT-SIGNALE	28
DIE SEITE IR TV ZUM STEuern DES FERNSEHERS	29
DIE SEITE IR VIDEO ZUM STEuern DES VIDEOREKORDERS	29
DIE SEITE IR CD ZUM STEuern DES CD-SPIELERS	30
DIE SEITE IR RADIO ZUM STEuern DER STEREOANLAGE.....	30
DIE SEITE IR KASSETTE ZUM STEuern DES KASSETTENREKORDERS	31
MP3-DATEIEN ABSPIELEN.....	32
COMPUTER STEuern.....	33
SEITEN ZUR COMPUTERSTEUERUNG VERKNÜPFEN.....	35
TOOLBOX ÖFFNEN	39
EINE LETZTE ANREGUNG: SPEICHERÜBERTRAGUNG DURCHFÜHREN.....	40
BENUTZERBEREICH SICHERN	40
BENUTZERBEREICH LADEN.....	42

ABC 60	43
DIE SCHRIFT-SEITE	43
GELBE TASTEN.....	44
BLAUE FUNKTIONSTASTEN.....	45
DIE ZEICHEN-SEITE	46
WORTVORHERSAGE	47
DIE THEMEN-SEITEN	48
DIE SEITE SÄTZE.....	49
DIE SEITE FLOSKELN	49
DIE SEITE TELEFON.....	50
DIE SEITE NOTRUF	50
DIE SEITE ZEIT	51
DIE SEITE MONATE.....	51
DIE SEITE ORTE	52
DIE SEITE FAMILIE	52
DIE SEITE NAMEN	53
DIE SEITE LEUTE.....	53
DIE SEITE ESSEN	54
DIE SEITE TRINKEN	54
DIE SEITE KLEIDUNG.....	55
DIE SEITE PFLEGE	55
DIE SEITE KÖRPER.....	56
DIE SEITE MEDIZIN	56
EIGENE ÄNDERUNGEN EINFÜGEN.....	57
SEITEN ÄNDERN	57
AUSSPRACHE KORRIGIEREN.....	62
BESONDERE FUNKTIONEN DES TALKERS.....	63
NOTIZBÜCHER.....	63
RECHNER.....	64
INFRAROT-SIGNALE	65
DIE SEITE IR TV ZUM STEuern DES FERNSEHERS	66
DIE SEITE IR VIDEO ZUM STEuern DES VIDEOREKORDERS	66
DIE SEITE IR CD ZUM STEuern DES CD-SPIELERS	67
DIE SEITE IR RADIO ZUM STEuern DER STEREOANLAGE.....	67
DIE SEITE IR KASSETTE ZUM STEuern DES KASSETTENREKORDERS	68
MP3-DATEIEN ABSPIELEN.....	69
COMPUTER STEuern.....	70
SEITEN ZUR COMPUTERSTEUERUNG VERKNÜPFEN.....	72
TOOLBOX ÖFFNEN	76
ALTERNATIVE SCHRIFTSEITE FÜR MENSCHEN MIT VISUELLEN PROBLEMEN	76
EINE LETZTE ANREGUNG: SPEICHERÜBERTRAGUNG DURCHFÜHREN.....	77
BENUTZERBEREICH SICHERN	77
BENUTZERBEREICH LADEN.....	79

Willkommen bei den ABC-Programmen

Die ABC-Programme kombinieren die Vorzüge einer Schrifteingabe, die von einer leistungsfähigen Wortvorhersage wirkungsvoll unterstützt wird, mit der Möglichkeit, häufig benötigte Wörter und Aussagen im Ganzen abzuspeichern, damit sie schnell zur Verfügung stehen. „ABC 45“ und „ABC60“ sind somit flexible Kommunikationsprogramme, durch die der Talker in Verbindung mit seinen speziellen Optionen wie z.B. Umfeldkontrolle, Notizbuchfunktionen oder Computersteuerung zu einem effektiven Kommunikationssystem wird.

In dieser Einführung stellen wir Ihnen die Programme „ABC 45“ und „ABC 60“ vor und geben erste Hinweise, wie Sie individuelle Veränderungen vornehmen können.


An verschiedenen Stellen verweisen wir dazu auf die **Bedienungsanleitung** (das gebundene Handbuch im A5-Format) und auf das **Kleine Handbuch** (ein dünneres A5-Heft), die beide zum Lieferumfang des Talkers gehören.

In beiden Handbüchern sind auch Funktionen beschrieben, die zwar **nicht** in den ABC-Programmen zum Tragen kommen, aber zu anderen Anwendungsprogrammen für Talker gehören und deshalb dargestellt werden müssen.


Zu den Informationen, die für die ABC-Programme **keine Relevanz** haben, gehören u. a. die Ausführungen zu „Kernvokabular“, „Ikonen“, „Dialeisten“ und „Dias“. Diese Kapitel können Sie außer Acht lassen.

ABC 45

Die SCHRIFT-SEITE

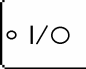Schalten Sie den Talker mit der linken Taste  über dem Display ein.

Die Lampe auf der Taste  leuchtet jetzt und im Display erscheint folgendes Bild:

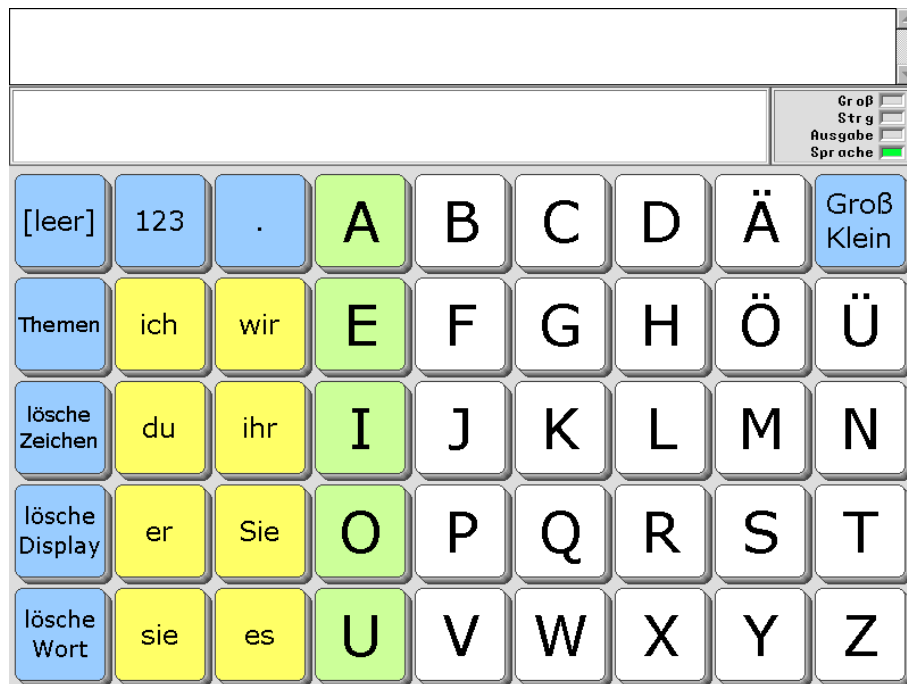

Die oberste Zeile, die im Augenblick noch leer ist, heißt Textfenster. Hier erscheinen im Folgenden die Buchstaben und Wörter, die Sie schreiben.

In der Zeile darunter erscheinen die Vorschläge der Wortvorhersage, sobald Sie zu schreiben beginnen.

Die Buchstaben auf der SCHRIFT-SEITE sind in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. Die Vokale (Selbstlaute) A, E, I, O und U sind hellgrün hinterlegt und stehen untereinander.

Sie können sofort mit dem Schreiben beginnen.

Tippen Sie z.B. nacheinander die einzelnen Buchstaben h a l l o und am Ende die Taste <leer> ganz oben links.

(Stören Sie sich bitte nicht daran, dass der Talker die einzelnen Buchstaben laut ausspricht. Das liegt daran, dass die Sprache eingeschaltet ist. Wie man die Sprachausgabe ein- und ausschalten kann, erfahren Sie bei den Erläuterungen zur THEMEN-SEITE weiter hinten in dieser Einführung.)

Im Textfenster in der oberen Zeile erscheint das Wort „hallo“.


Tippen Sie auf das angezeigte Wort „hallo“, und der Talker spricht das ganze Wort.

Gelbe Tasten

Außer den Buchstaben befinden sich auf der SCHRIFT-SEITE gelbe Tasten mit den Wörtern <ich>, <du>, <er>, <sie>, <es>, <wir>, <ihr> und <Sie>. Diese Tasten öffnen jeweils eine Seite mit häufig benötigten Satzanfängen und Fragen.

Drücken Sie die Taste <ich>.

Es öffnet sich die ICH-SEITE mit Phrasen und Fragen, in denen das Wort „ich“ vorkommt.

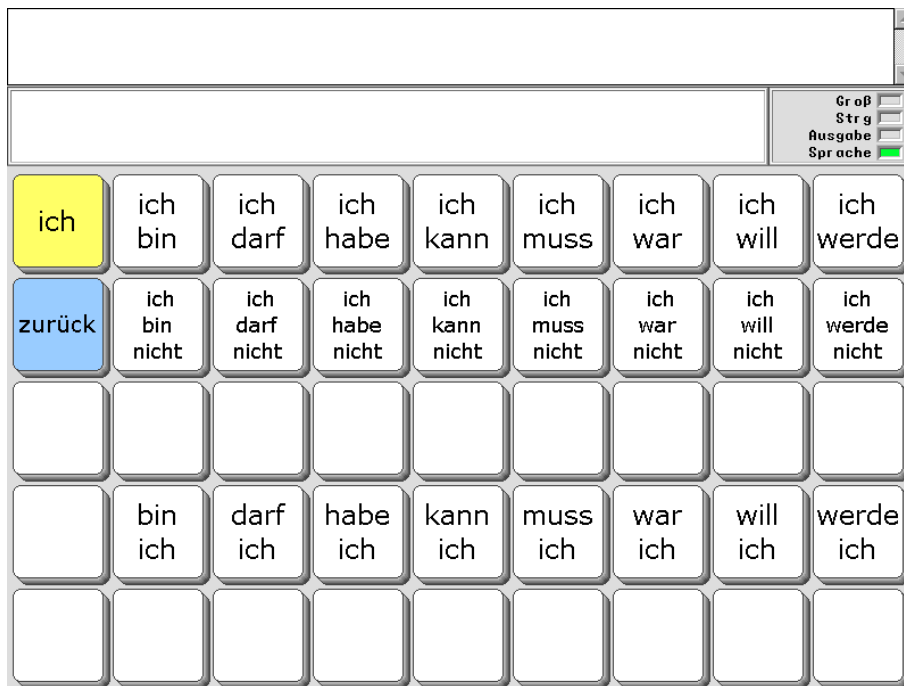

Tippen Sie auf das Feld <ich bin>.

Im Textfenster erscheinen jetzt die Wörter „ich bin“ und die Anzeige wechselt zurück zur SCHRIFT-SEITE mit der Buchstabentastatur. Tippen Sie ein Wort Ihrer Wahl, um den Satz zu vollenden und drücken Sie danach direkt auf die Schrift im Textfenster, um den Satz im Zusammenhang sprechen zu lassen.

Die gelben Tasten <du>, <er>, <sie>, <es>, <wir>, <ihr> und <Sie> öffnen Seiten, die nach dem selben Muster aufgebaut sind wie die ICH-SEITE.

Blaue Funktionstasten

Auf der SCHRIFT-SEITE befinden sich auch einige blau unterlegte Tasten mit Funktionen, die beim Schreiben wichtig sind:



Leerzeichen



Zeichen löschen



Inhalt des Textfensters löschen



Wort löschen



Wechsel zwischen großen und kleinen Buchstaben




Wechsel zur ZEICHEN-SEITE

Die ZEICHEN-SEITE

123

Drücken Sie auf der SCHRIFT-SEITE die Taste mit dem Punkt:

Die Anzeige im Display wechselt und Sie sehen nun die ZEICHEN-SEITE:

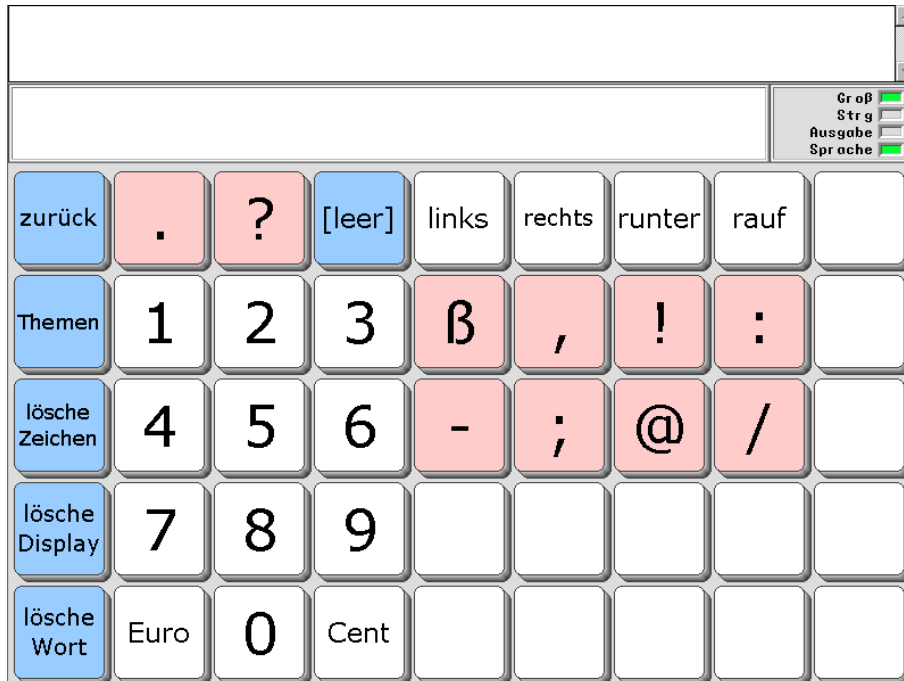



Wenn Sie auf der ZEICHEN-SEITE eine rosa eingefärbte Taste (z.B. Punkt oder Fragezeichen) drücken, springt die Anzeige automatisch wieder zurück zur SCHRIFT-SEITE.



Bei den Ziffern und den Pfeiltasten bleibt die ZEICHEN-SEITE so lange stehen, bis Sie sie durch Drücken der Zurück-taste oben links aktiv verlassen.


Wortvorhersage

Der Talker verfügt über eine leistungsfähige Wortvorhersage mit über 20.000 Wörtern. Beim Schreiben erscheinen unterhalb des Textfensters orange hinterlegte Wortvorschläge, die Sie durch direktes Antippen auswählen können, um den Schreibprozess abzukürzen.

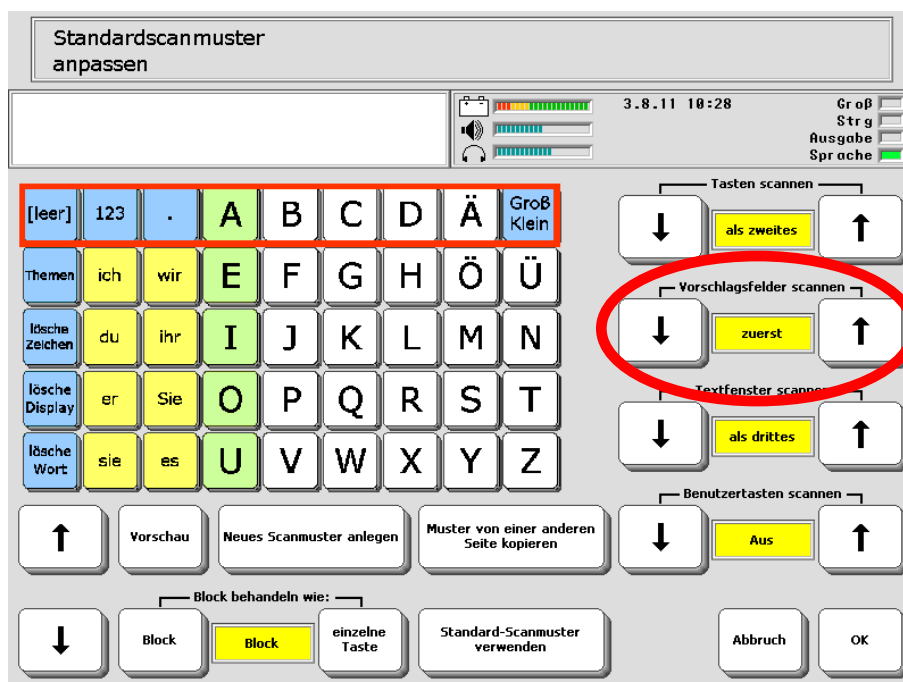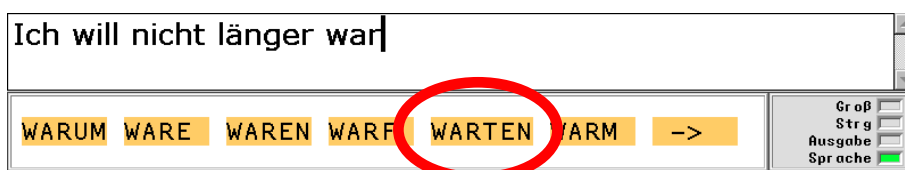

Falls Sie den Talker nicht direkt über das Display, sondern im Scanning-Modus mit einer externen Taste bedienen, können Sie im Menü ANSTEUERUNG – SCANMUSTER ANPASSEN – STANDARD-SCANMUSTER ANPASSEN einstellen, wann der Talker die die Vorschläge aus der Wortvorhersage scannt.

Ein- und Ausschalten sowie Anpassen können Sie die Wortvorhersage über die Toolbox, Menü Wortvorhersage.

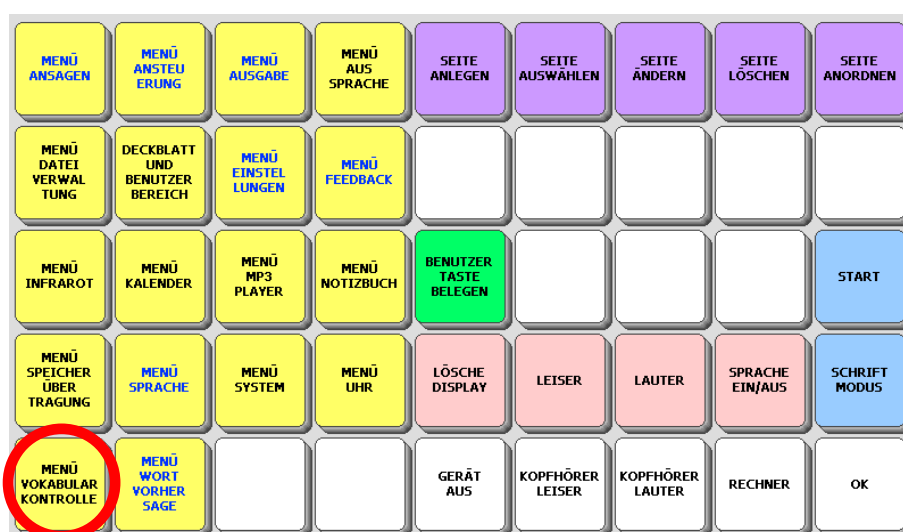


Wie Sie neue Wörter in das Wortvorhersage-Lexikon einfügen können, lesen Sie bitte in dem Heft „Das kleine Handbuch“, das Sie mit dem Talker erhalten haben.

Die THEMEN-SEITEN

Zusätzlich zu den Möglichkeiten der Schrifteingabe bietet der Talker auch die Funktion, Wörter und Sätze, die man häufig benötigt, als Ganzes abzuspeichern, damit man sie nicht jedes Mal wieder schreiben muss.



Drücken Sie die Taste Themen auf der SCHRIFT-SEITE.
Die Anzeige im Display wechselt und Sie sehen die THEMEN-SEITE:

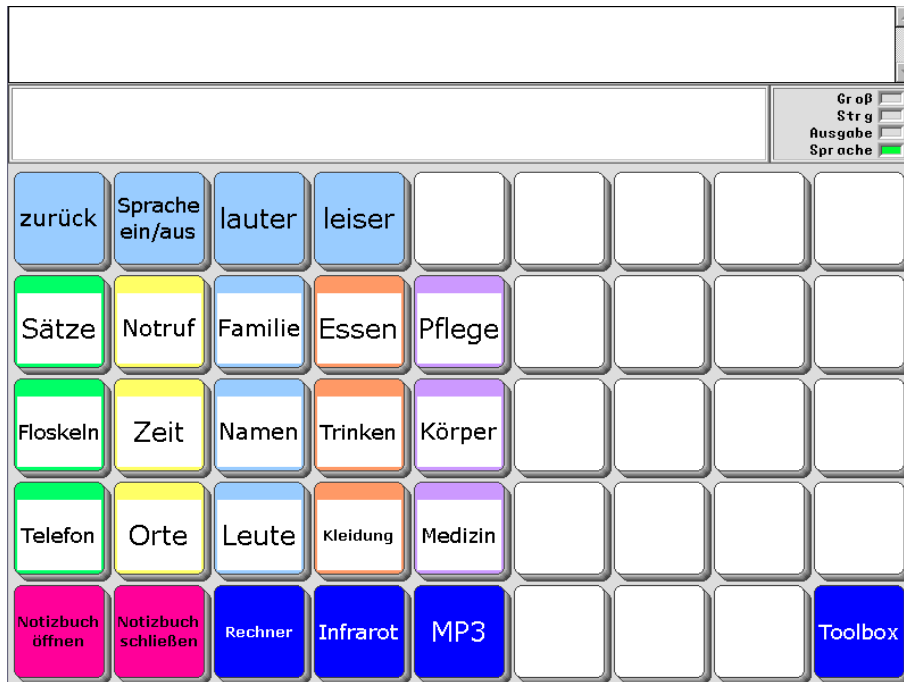

In der oberen Zeile befinden sich hellblau hinterlegt folgende Funktionen:



Wechsel zurück zur SCHRIFT-SEITE



Sprache ein / aus: Wenn die Sprachausgabe eingeschaltet ist, spricht der Talker nach jeder Eingabe (z.B. nach jedem Buchstaben). Ist die Sprache ausgeschaltet, spricht der Talker erst, wenn Sie auf die Schrift im Textfenster drücken.



Sprachausgabe lauter



Sprachausgabe leiser

Die Tasten in den Zeilen 2 – 4 öffnen Seiten zu verschiedenen Themenbereichen, die Sie individuell verändern können (weiter hinten in dieser Einführung wird die entsprechende Vorgehensweise erläutert). Auf den Tasten steht jeweils der Name der damit zu öffnenden Seite.



Die Seiten sind alle nach derselben Struktur aufgebaut. Die Mehrzahl taste ist nur aktiv, wenn von einem einzelnen Wort die Mehrzahl gebildet werden kann, z.B. bei den Kleidungsstücken oder den Lebensmitteln.

Im Folgenden sind alle Themenseiten abgebildet.

Die Seite SÄTZE

Sätze

Die Seite FLOSKELN

Floskeln

Die Seite TELEFON



									Größ Strg Ausgabe Sprache
zurück		WORTLISTE SCANNEN	OK	ja	nein	danke	Tschüs!	Hallo!	
Themen	Hier spricht	Sprach Computer	Bitte ja/nein-Fragen stellen	Moment bitte, ich schreibe		Ihre Fax Nummer	Ihre Tel. Nummer	Ihre Handy Nummer	
lösche Zeichen	Bitte wiederholen Sie	Bitte erklären	Ich habe nicht verstanden	Ich habe verstanden		Meine Fax Nummer	Meine Tel. Nummer	Meine Handy Nummer	
lösche Display	Wie ist Ihr Name	Ich möchte sprechen mit				Schicken Sie bitte ein Fax	Bitte später wieder anrufen	Ich werde ein Fax schicken	
lösche Wort									

Die Seite NOTRUF



									Größ Strg Ausgabe Sprache
zurück		WORTLISTE SCANNEN		ja	nein				
Themen	Ich brauche Hilfe!	Mein Name ist	Ich wohne in	Telefon					
lösche Zeichen									
lösche Display									
lösche Wort									

Die Seite ZEIT



Mit der dunkel-blauen Taste **MONATE** wechseln Sie auf die Seite **MONATE**, die nur für eine Auswahl geöffnet bleibt.




Die Seite MONATE



Die **MONATE-SEITE** erreichen Sie über die dunkelblaue Taste auf der **ZEIT-SEITE**.

Die **MONATE-SEITE** öffnet sich jeweils nur für eine Auswahl.

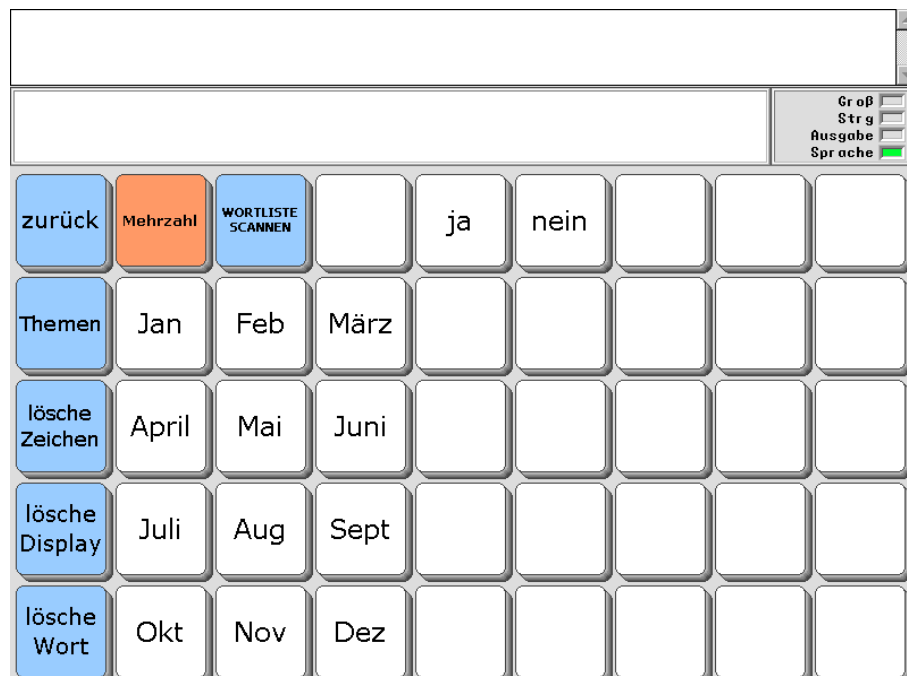

Die Seite ORTE

Orte

										Groß Strg Ausgabe Sprache
zurück	Mehrzahl	WORTLISTE SCANNEN		ja	nein					
Themen	Geschäft	Markt	Bank	Bäcker	Metzger					
lösche Zeichen	Apotheke	Post	Aldi	Lidl	Kiosk					
lösche Display	Park	Kirche	Kino	Bahnhof	Tankstelle					
lösche Wort										

Die Seite FAMILIE

Familie

										Groß Strg Ausgabe Sprache
zurück	Mehrzahl	WORTLISTE SCANNEN		ja	nein					
Themen										
lösche Zeichen										
lösche Display										
lösche Wort										

Die Seite NAMEN

Namen

zurück	Mehrzahl	WORTLISTE SCANNEN		ja	nein			
Themen								
lösche Zeichen								
lösche Display								
lösche Wort								

Die Seite LEUTE

Leute

zurück	Mehrzahl	WORTLISTE SCANNEN		ja	nein			
Themen	Frau	Mann	Besuch	Nachbar				
lösche Zeichen	Mädchen	Junge	Kind	Baby				
lösche Display								
lösche Wort								

Die Seite ESSEN

Essen

										Gr oß	<input type="checkbox"/>
										Str g	<input type="checkbox"/>
										Ausgabe	<input type="checkbox"/>
										Spr ache	<input checked="" type="checkbox"/>
zurück	Mehrzahl	WORTLISTE SCANNEN		ja	nein						
Themen	Brot	Butter	Marmelade	Käse	Joghurt						
lösche Zeichen	Gemüse	Salat	Kartoffel	Apfel	Banane						
lösche Display	Fleisch	Pizza	Nudeln	Keks	Kuchen						
lösche Wort											

Die Seite TRINKEN

Trinken

										Gr oß	<input type="checkbox"/>
										Str g	<input type="checkbox"/>
										Ausgabe	<input type="checkbox"/>
										Spr ache	<input checked="" type="checkbox"/>
zurück	Mehrzahl	WORTLISTE SCANNEN		ja	nein						
Themen	Glas	Becher	Tasse	Flasche	Stroh halm						
lösche Zeichen	Saft	Limo nade	Cola	Kakao	Mineral wasser						
lösche Display	Kaffee	Tee	Milch	Zucker	Wasser						
lösche Wort											

Die Seite KLEIDUNG



										Gr oß	<input type="checkbox"/>
										Str g	<input type="checkbox"/>
										Ausgabe	<input type="checkbox"/>
										Spr ache	<input checked="" type="checkbox"/>
zurück	Mehrzahl	WORTLISTE SCANNEN		ja	nein						
Themen	Jacke	Pullover	Hose	Schuh		rot	gelb	grün			
lösche Zeichen	Kleid	Hemd	Unter wäsche	Socke		blau	schwarz	weiß			
lösche Display	Rock	T-Shirt	Strumpf hose	Halstuch		braun	grau	bunt			
lösche Wort											

Die Seite PFLEGE



										Gr oß	<input type="checkbox"/>
										Str g	<input type="checkbox"/>
										Ausgabe	<input type="checkbox"/>
										Spr ache	<input checked="" type="checkbox"/>
zurück	Mehrzahl	WORTLISTE SCANNEN		ja	nein						
Themen	Wasch becken	Dusche	Badewanne	Klo	Klopapier						
lösche Zeichen	Seife	Shampoo	Zahn bürste	Zahnpasta	Deo						
lösche Display	Handtuch	Wasch lappen	Fön	Kamm	Make-up						
lösche Wort											

Die Seite KÖRPER



Mit der dunkelblauen Taste MEDIZIN können Sie direkt von der KÖRPER-SEITE zur MEDIZIN-SEITE wechseln.

								<input type="checkbox"/> Groß <input type="checkbox"/> Strg <input type="checkbox"/> Ausgabe <input checked="" type="checkbox"/> Sprache
zurück	Mehrzahl	WORTLISTE SCANNEN	Medizin	ja	nein			
Themen	Schmerz	Rücken	Bauch	Magen	Herz			
lösche Zeichen	Kopf	Hals	Nase	Ohr	Zahn			
lösche Display	Hüfte	Bein	Fuß	Arm	Hand			
lösche Wort								

Die Seite MEDIZIN



Mit der dunkelblauen Taste KÖRPER können Sie direkt von der MEDIZIN-SEITE zur KÖRPER-SEITE wechseln.

								<input type="checkbox"/> Groß <input type="checkbox"/> Strg <input type="checkbox"/> Ausgabe <input checked="" type="checkbox"/> Sprache
zurück	Mehrzahl	WORTLISTE SCANNEN	KÖRPER	ja	nein			
Themen	Ich brauche ein Rezept	Tablette	Spritze	Salbe	Pflaster			
lösche Zeichen	Arzt	Zahnarzt	Kranken gymnastik	Logo	Ergo therapie			
lösche Display	Brille	Hörgerät	Talker	Gehhilfe	Rollator			
lösche Wort								


Eigene Änderungen einfügen


Bevor wir zu den Sonderfunktionen in der unteren Zeile der THEMEN-SEITE kommen, erfahren Sie, wie Sie eigene Änderungen in das Programm „ABC 45“ einfügen können.

Seiten ändern


Das Programm „ABC 45“ ist aus einzelnen Seiten zusammengesetzt. Um Änderungen vorzunehmen, werden Sie hauptsächlich die lila Tasten in der oberen Reihe der Toolbox benötigen.

Wie Sie Seiten ändern können, wird im Folgenden Schritt für Schritt am Beispiel der NOTRUF-SEITE erläutert:


Drücken Sie die Taste  über dem Display, um die Toolbox zu öffnen.
Drücken Sie die Taste SEITE ÄNDERN

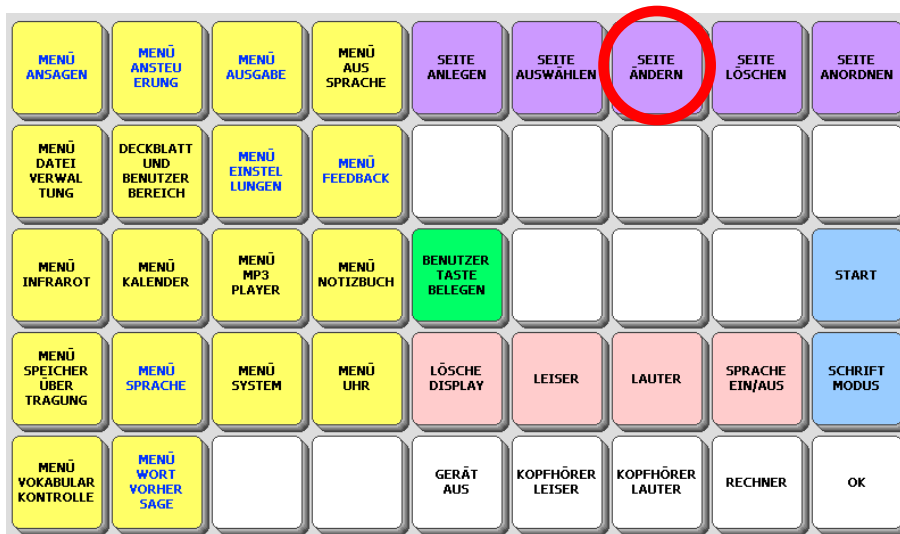

Wählen Sie die zu ändernde Seite aus: NOTRUF

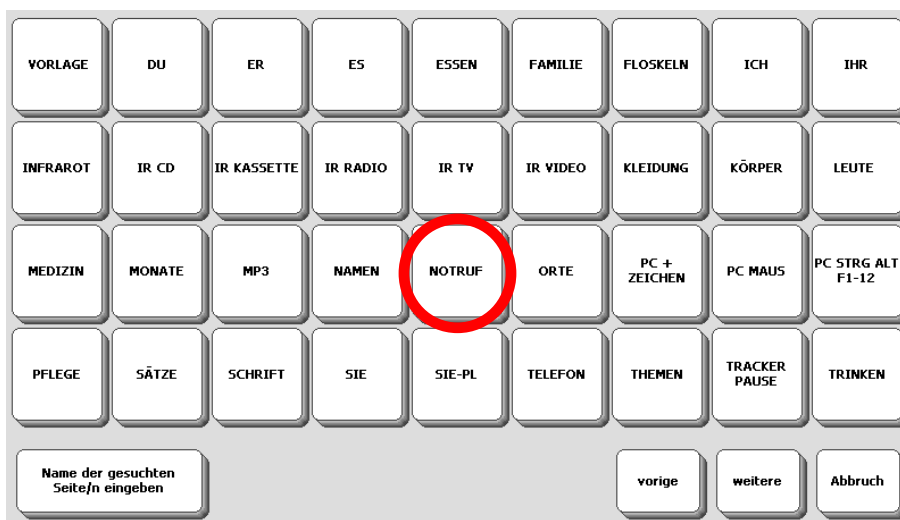


Im Display erscheint die NOTRUF-SEITE und links im Textfenster steht die Aufforderung: „Taste auswählen“.

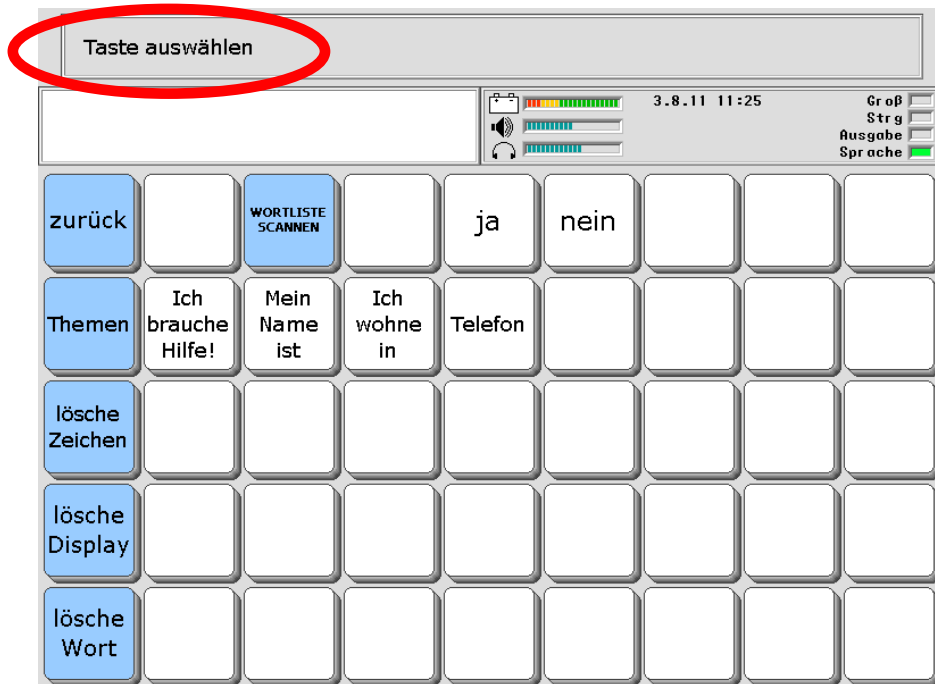


Auf der NOTRUF-SEITE müssen Ihr Name, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer ergänzt werden.

Wählen Sie zuerst die Taste <Mein Name ist>

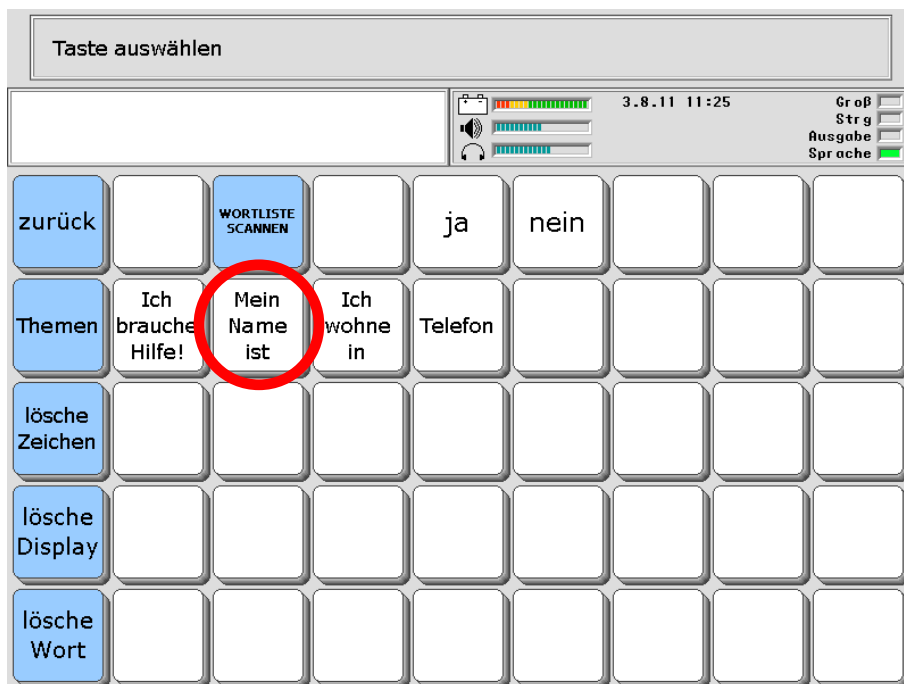


Sie sehen folgende Anzeige:

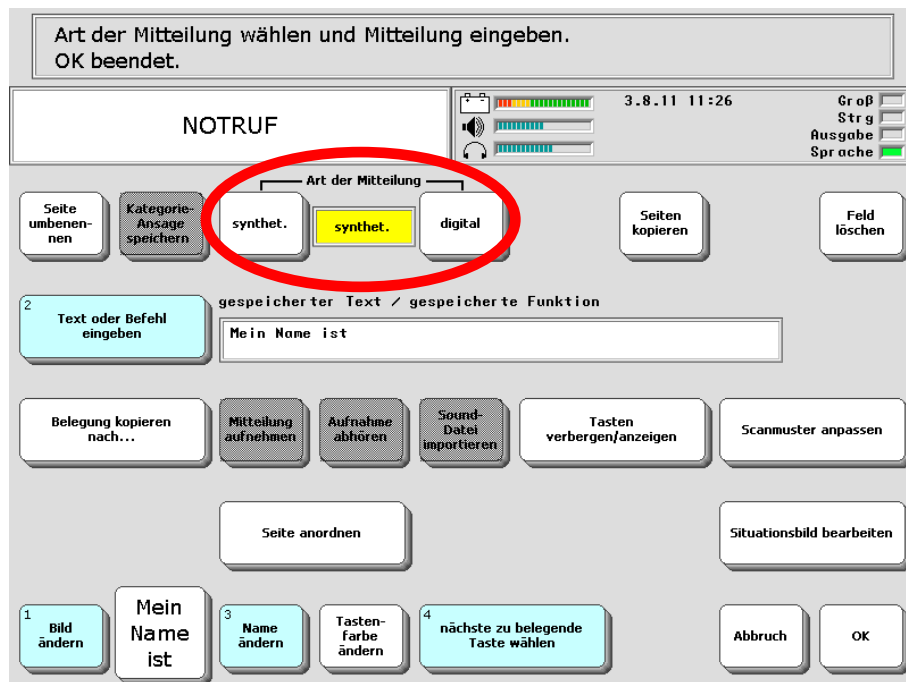


Im gelben Feld oben in der Mitte steht für „Art der Mitteilung = synthet.“.
Das bedeutet, dass die Mitteilung mit der Computerstimme des Talkers gesprochen wird.

Darunter sehen Sie:

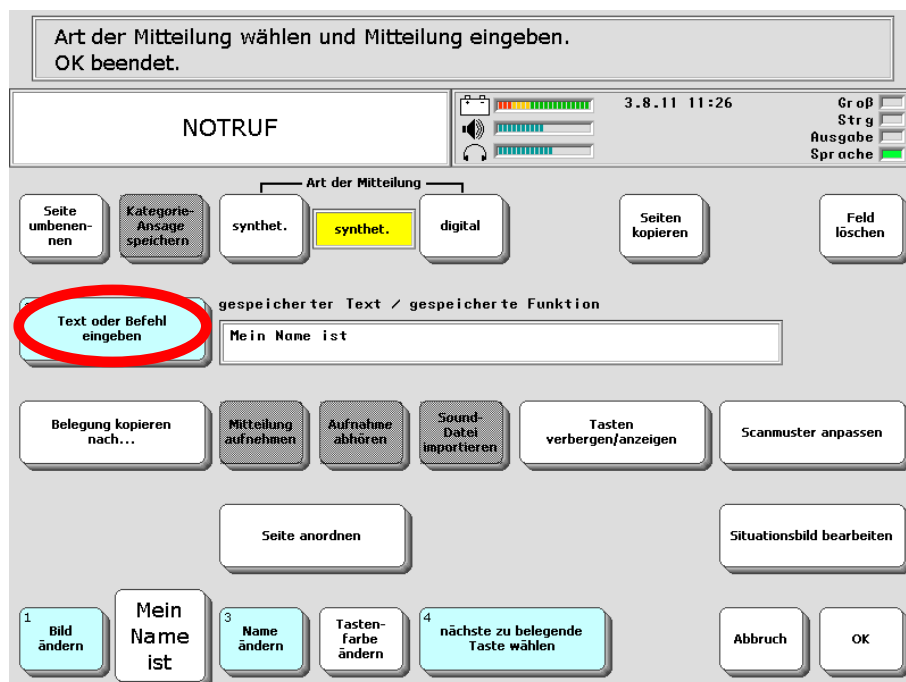


Drücken Sie <Text oder Befehl eingeben>.

Mit Hilfe der Buchstabentastatur, die dann erscheint, können Sie Ihren Namen eingeben.

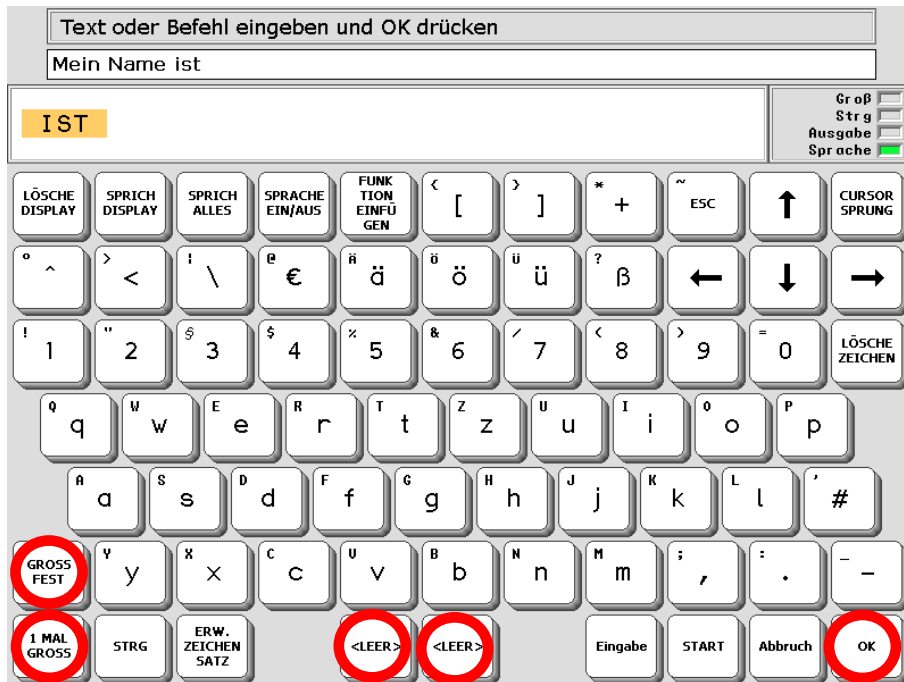

Mit den beiden Tasten unten links können Sie die Groß- und Kleinschreibung verändern. Nach Ihrem Namen machen Sie bitte ein Leerzeichen (unten Mitte). Beenden Sie die Eingabe mit <OK> (unten rechts).

Die Anzeige im Display springt zurück und Sie sehen den ergänzten Text:

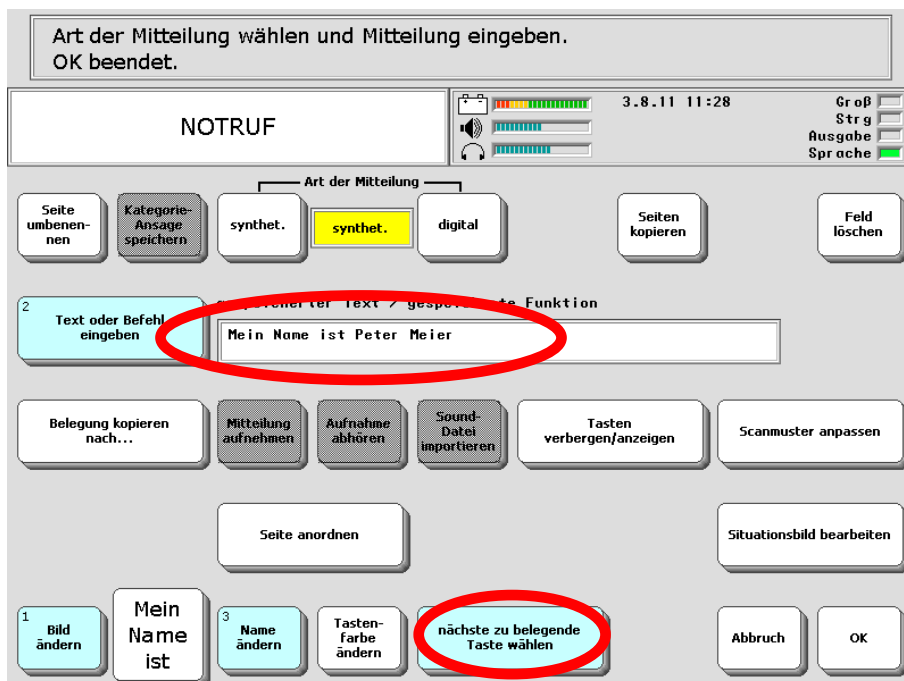


Um auch die Angaben auf den Tasten <Ich wohne in> und <Telefon> zu ergänzen, drücken Sie das Feld <nächste zu belegende Taste wählen> und verfahren Sie wie im vorangegangenen Beispiel.

Felder, auf denen noch nichts gespeichert ist, können Sie selbst belegen, indem Sie einen eigenen Text eingeben.


Wenn der Text zu lang ist, um auf der Taste angezeigt zu werden, wählen Sie die Funktion <Name ändern> und geben dort nur ein Stichwort als Merkhilfe ein.

Wenn Sie auf der Taste ein Bild hinzufügen möchten, gelangen Sie mit der Funktion <Bild ändern> in das Bildarchiv des Talkers. Standardmäßig enthält der Talker im Modus „ABC-Programme“ keine Bilder. Um Bilder zu verwenden:

1. Erwerben Sie einen der optional erhältlichen Symbolsätze PCS oder METACOM.
2. Importieren Sie eigene Bilder in den Talker (siehe Handbuch).

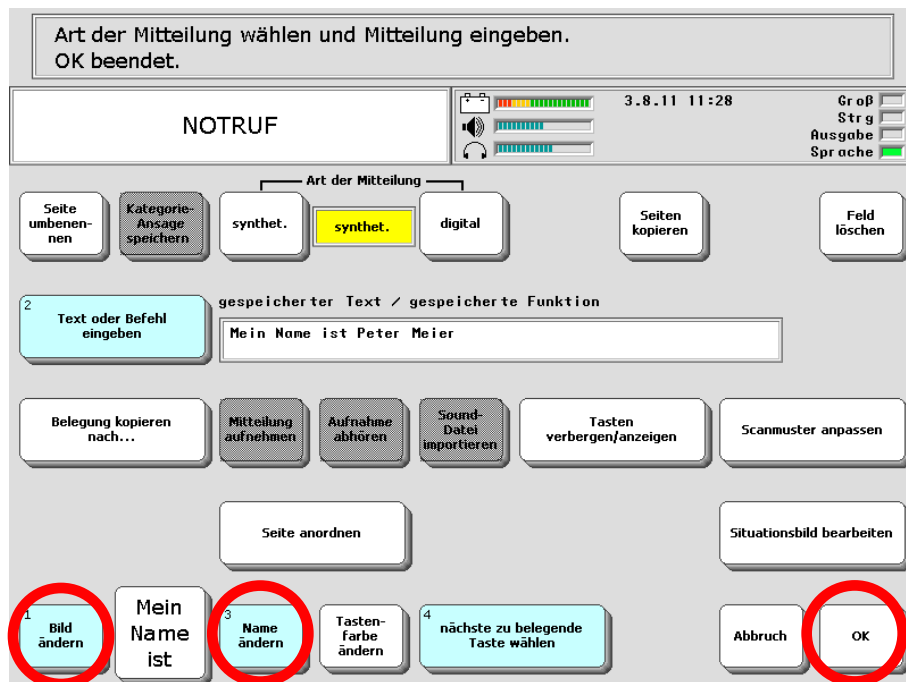

Nachdem Sie Ihre persönlichen Änderungen eingefügt haben, beenden Sie das Menü mit <OK> (unten rechts). Es erscheint wieder die Toolbox.

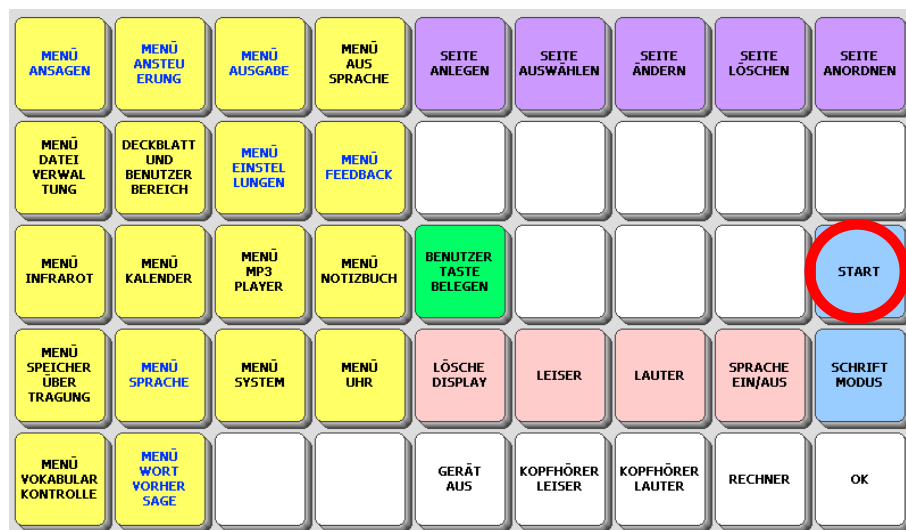


Die hellblaue Taste <START> bringt Sie zurück zum Ausgangsseite SCHRIFT des Programms „ABC 45“.

Ausführliche Informationen zum Thema „Seiten“ entnehmen Sie bitte dem Heft „Das kleine Handbuch“, das Sie mit dem Talker erhalten haben oder der Bedienungsanleitung im Kapitel „Das persönliche Deckblatt / Seiten“.

Aussprache korrigieren

Besonders bei Namen von Personen und Orten kann es vorkommen, dass der Talker den Namen mit der synthetischen Stimme nicht so ausspricht, wie Sie es gerne hätten. In diesem Fall sollten Sie das betreffende Wort zum Aussprache-Lexikon hinzufügen, damit der Talker lernt, den Begriff richtig auszusprechen.

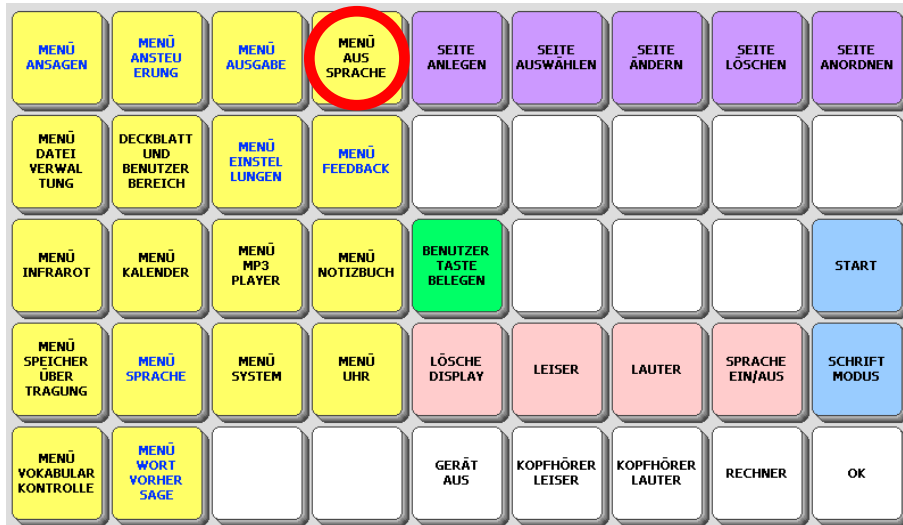

Wie Sie neue Wörter in das Aussprache-Lexikon einfügen können, entnehmen Sie bitte dem Heft „Das kleine Handbuch“, das Sie mit dem Talker erhalten haben.

Besondere Funktionen des Talkers

Die untere Zeile auf der THEMEN-SEITE bezieht sich auf spezielle Möglichkeiten des Talkers, die im Folgenden vorgestellt werden.




Notizbücher

Wenn Sie längere Texte verwalten möchten, können Sie dafür die NOTIZBUCH-Funktionen des Talkers benutzen. Wir haben im Programm „ABC 45“ bereits 6 Notizbücher angelegt, die Sie mit den pink hinterlegten Tasten <NB öffnen> und <NB schließen> von der THEMEN-SEITE aus direkt benutzen können.

Dass ein Notizbuch geöffnet ist, erkennen Sie an dem grün hinterlegten Textfenster.

Wie Sie die Notizbücher umbenennen oder neue anlegen, erfahren Sie in der Bedienungsanleitung im Kapitel „Notizbücher“.

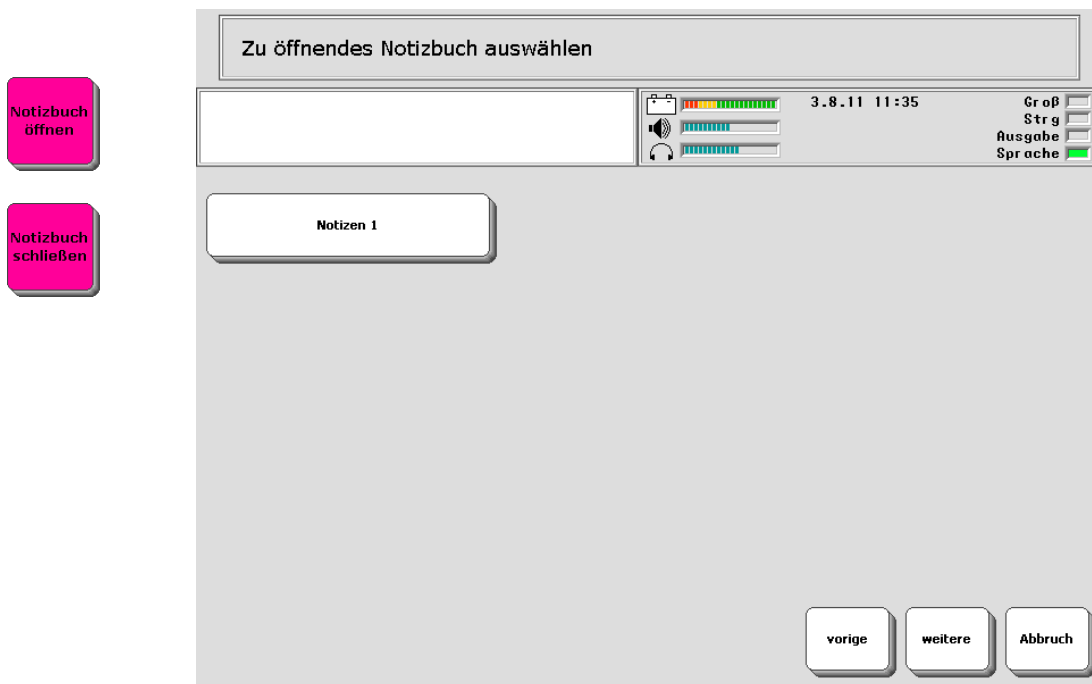

Rechner



0

3.8.11 11:41

Gr o ß
Str g
Ausgabe
Spr ache

7	8	9	÷	x ^y	Quadrat- wurzel
4	5	6	×	1/x	Zeichen löschen
1	2	3	-	%	c
0	±	,	+	=	AC

wissenschaftlicher Rechner


Abbruch OK

Infrarot-Signale

Der Talker verfügt über eine eingebaute lernfähige Infrarot-Umfeldkontrolle. Das bedeutet, dass Sie mit dem Talker Ihre IR-fernbedienbaren Geräte steuern können, wenn Sie dem Talker zuvor die entsprechenden IR-Befehle beigebracht haben.

Bitte lesen Sie dazu die entsprechenden Abschnitte im Kapitel „Umfeldkontrolle“ in der Bedienungsanleitung.

Im Programm „ABC 45“ haben wir bereits Seiten angelegt, auf denen Sie die IR-Befehle für TV, Video, CD, Radio und Kassette speichern können. Die Seiten zu den verschiedenen Geräten öffnen Sie von der INFRAROT-SEITE ausgehend.

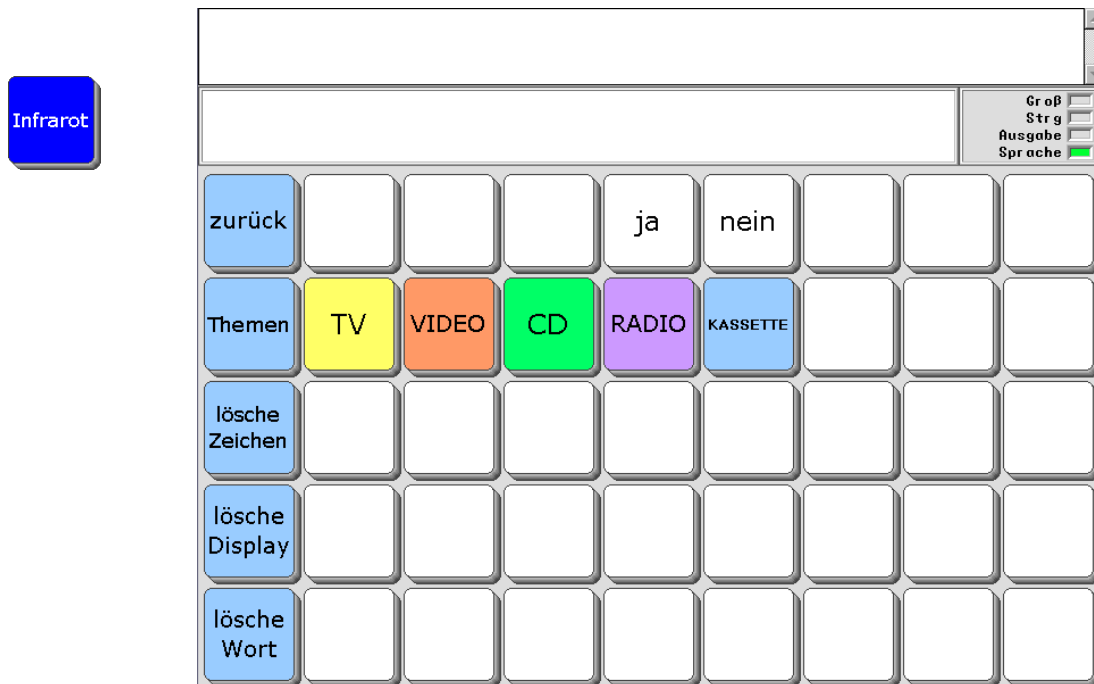

Die Seite IR TV zum Steuern des Fernsehers



										Größ	<input type="checkbox"/>
										Strg	<input type="checkbox"/>
										Ausgabe	<input type="checkbox"/>
										Sprache	<input checked="" type="checkbox"/>
zurück	ein aus	lauter	leiser	stumm							
VIDEO	1	2	3		10	11	12	13			
CD	4	5	6		14	15	16	17			
RADIO	7	8	9		18	19	20	21			
KASSETTE	nächstes Prog	0	voriges Prog		22	23	24	25			

Die Seite IR VIDEO zum Steuern des Videorekorders




										Größ	<input type="checkbox"/>
										Strg	<input type="checkbox"/>
										Ausgabe	<input type="checkbox"/>
										Sprache	<input checked="" type="checkbox"/>
zurück	ein aus	lauter	leiser	stumm	Abspielen	Stop	Pause				
TV	1	2	3		vorwärts	Auswurf	zurück				
CD	4	5	6								
RADIO	7	8	9								
KASSETTE	nächstes	0	voriges								

Die Seite IR CD zum Steuern des CD-Spielers



Die Seite IR RADIO zum Steuern der Stereoanlage

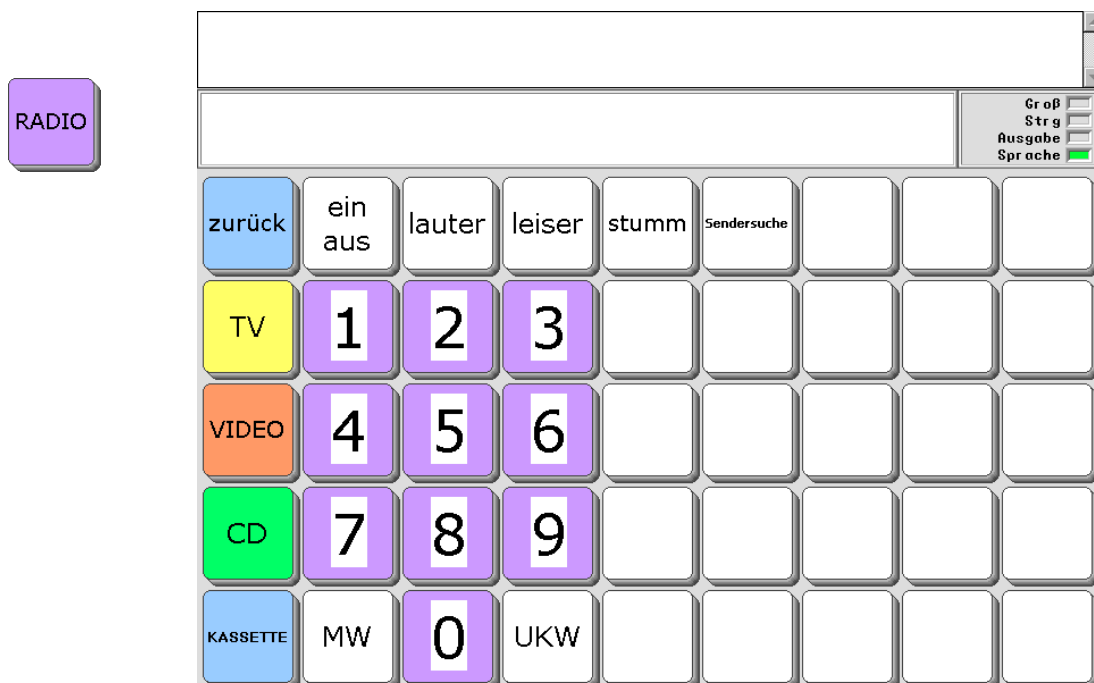

Die Seite IR KASSETTE zum Steuern des Kassettenrekorders

KASSETTE

zurück	ein aus	lauter	leiser	stumm	Abspielen	Stop	Pause		
TV					vorwärts	Auswurf	zurück		
VIDEO									
CD									
RADIO									

MP3-Dateien abspielen

Der Talker kann Musik-Dateien im Format MP3, WMA und WAV wiedergeben. Sie können einzelne Dateien entweder direkt auf der MP3-Seite speichern oder sie mit Hilfe des Menüs MP3-PLAYER von einem USB-Stick oder einer SD-Karte lesen lassen.



Um eine Musik-Datei direkt auf der MP3-SEITE zu speichern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. USB-Stick anschließen oder SD-Karte mit der oder den zu speichernden Datei(en) einlegen
2. Toolbox öffnen
3. SEITE ÄNDERN: Seite „MP3“ auswählen
4. Taste auswählen, auf der die Datei gespeichert werden soll
5. NAME ÄNDERN: z.B. Titel eingeben
6. ART DER MITTEILUNG: digital
7. SOUNDDATEI IMPORTIEREN: Datei auswählen
8. OK
9. START


Da Musik-Dateien viel Speicherplatz benötigen, empfehlen wir Ihnen, nur eine begrenzte Zahl von Liedern direkt auf der MP3-SEITE zu speichern und ansonsten das Menü MP3-PLAYER zur Wiedergabe von Sounddateien zu benutzen, die von einem externen Datenträger (USB-Stick, SD-Karte) wiedergegeben werden.

Lesen Sie dazu bitte das Kapitel „MP3-Player“ in der Bedienungsanleitung.


Computer steuern

Der Talker kann als Tastatur und Mauseinsatz zur Computeransteuerung benutzt werden. Wir haben für Sie bereits 3 Seiten zur PC-Steuerung vorbereitet, die zwar im Seitenarchiv Ihres Talkers hinterlegt, aber standardmäßig **nicht** mit der Benutzerebene verknüpft sind.


im Lieferzustand noch keine Verknüpfung!

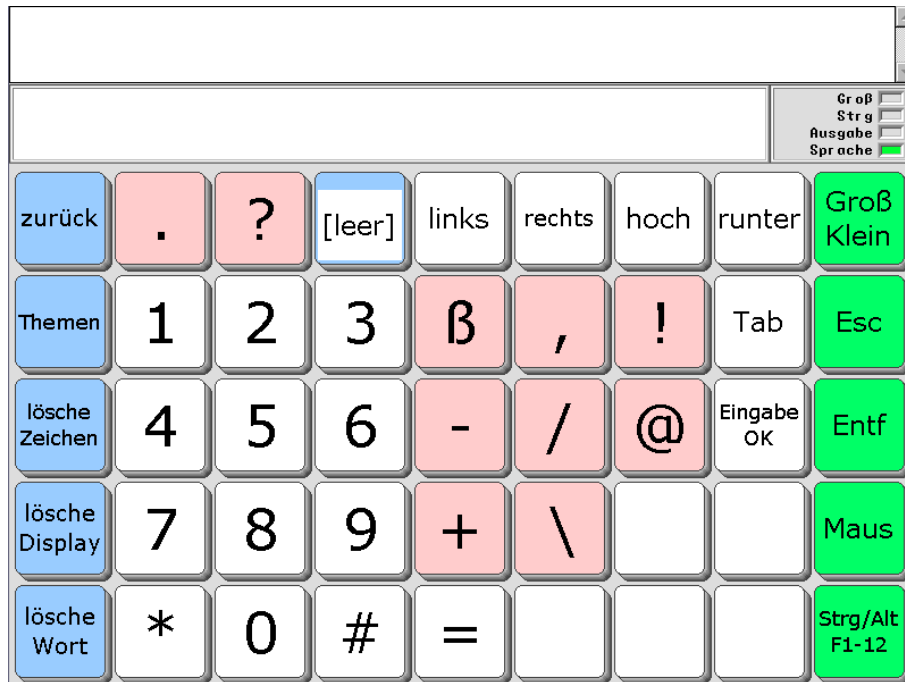

Strg/Alt F1-12

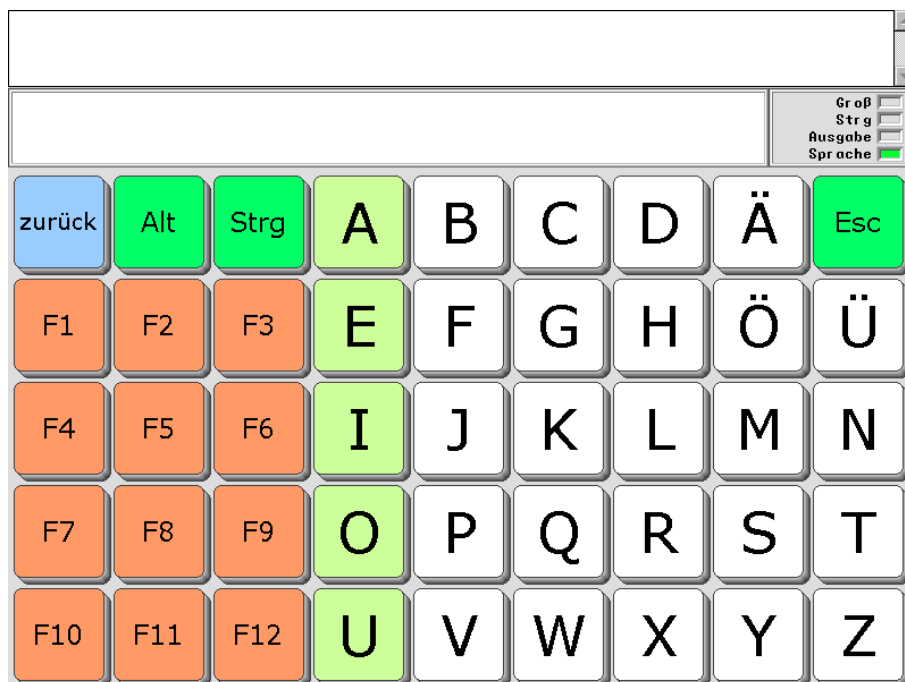

Maus

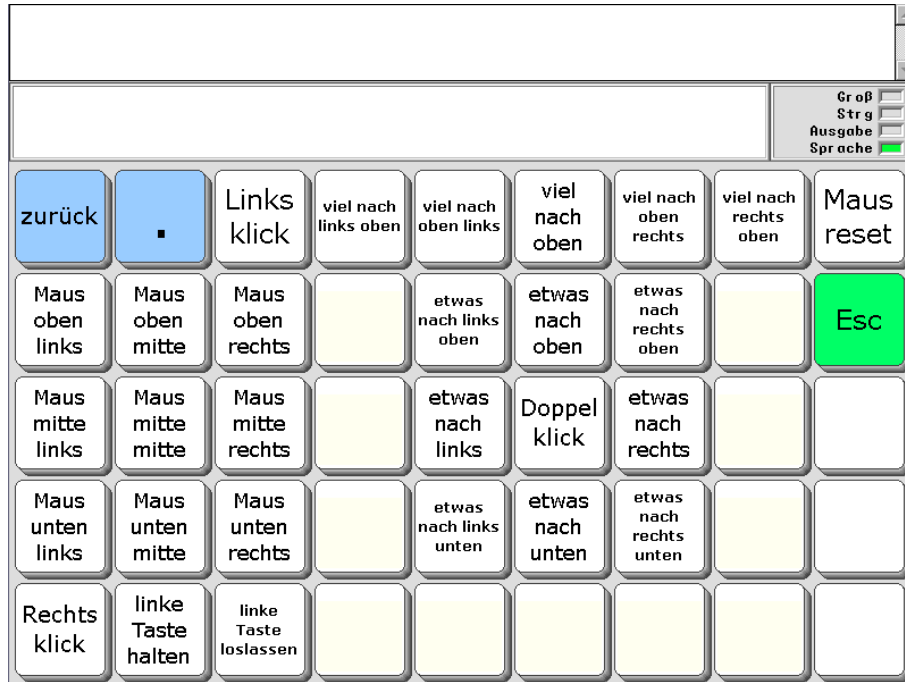


Seiten zur Computersteuerung verknüpfen

Wenn Sie die PC-Seiten nutzen möchten, brauchen Sie nur eine Verknüpfung zu ändern. Die Änderung betrifft auf der SCHRIFT-SEITE die Taste mit dem Punkt.

Um die Änderung vorzunehmen gehen Sie bitte wie folgt vor:


1. Toolbox öffnen
2. <SEITE ÄNDERN> : wählen Sie die SCHRIFT-SEITE
3. <Taste auswählen> : wählen Sie die Taste mit dem Punkt
4. <Text oder Befehl eingeben>

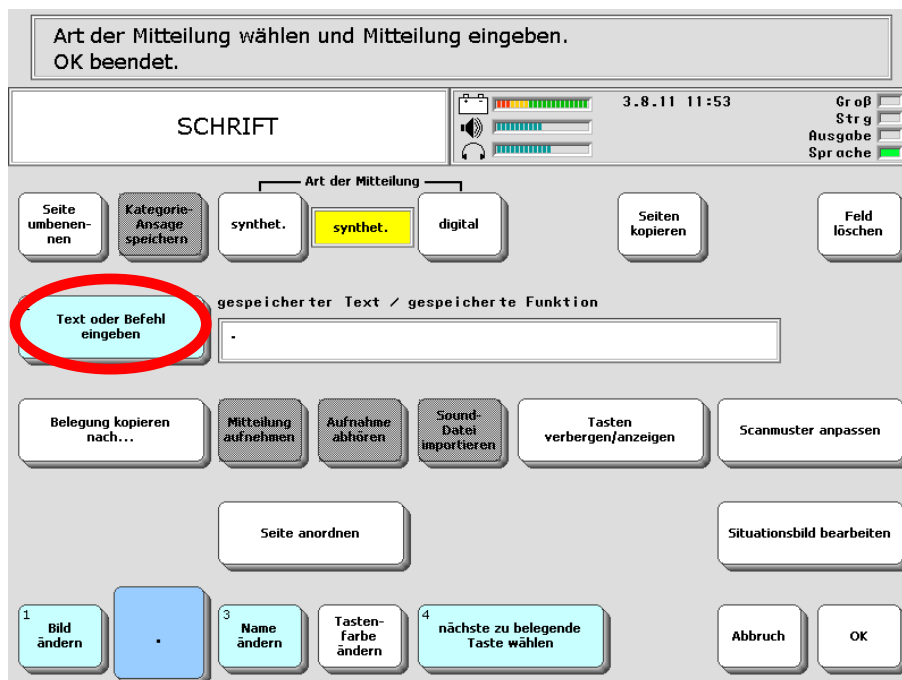


5. <lösche Display>
6. <Funktion einfügen>




7. Tippen Sie 3x <weitere>

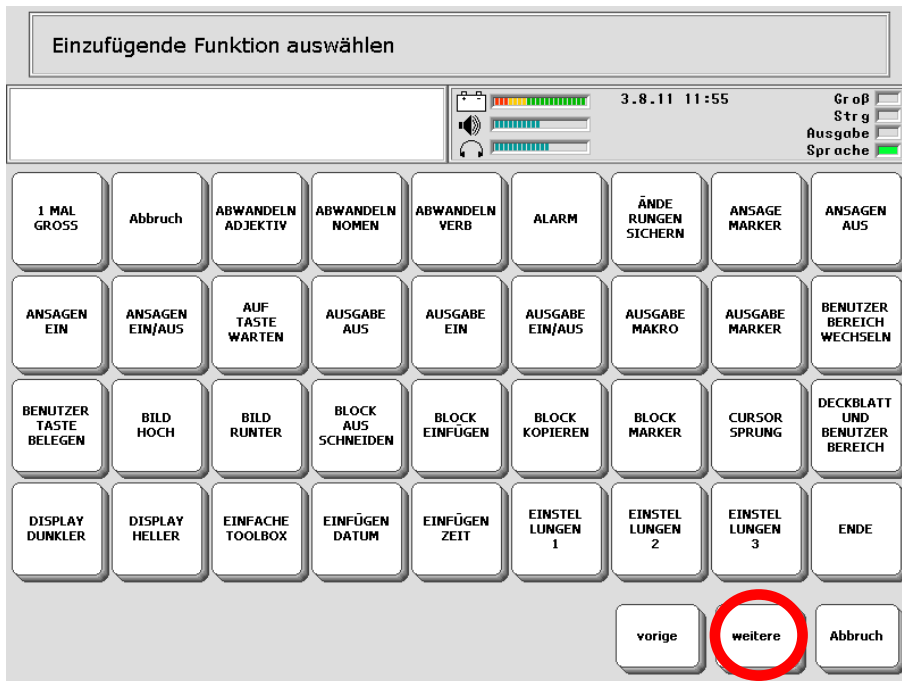


8. <Seite anzeigen>

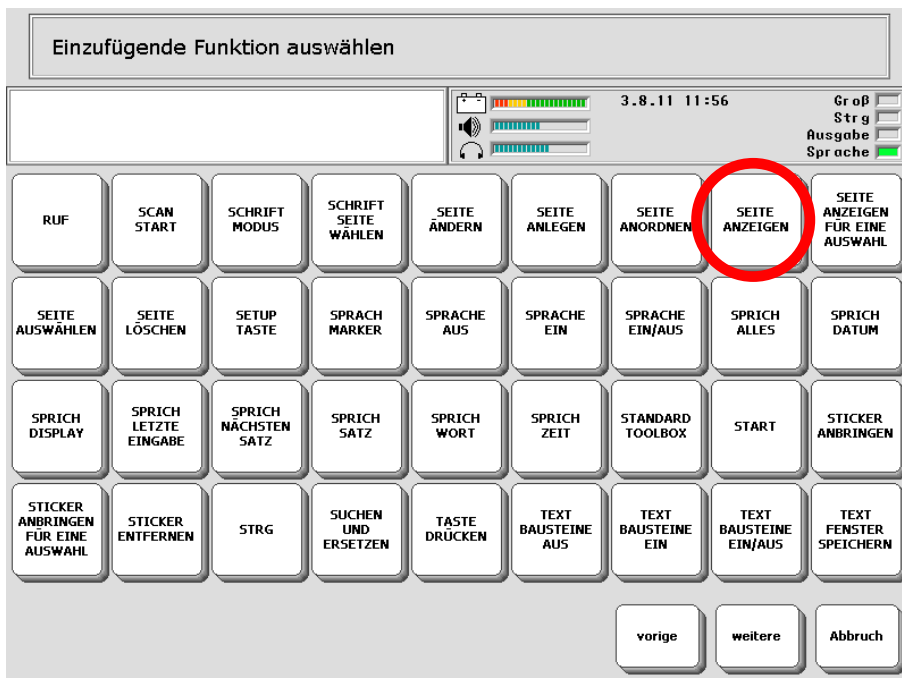


9. Wählen Sie die Seite „PC + ZEICHEN“

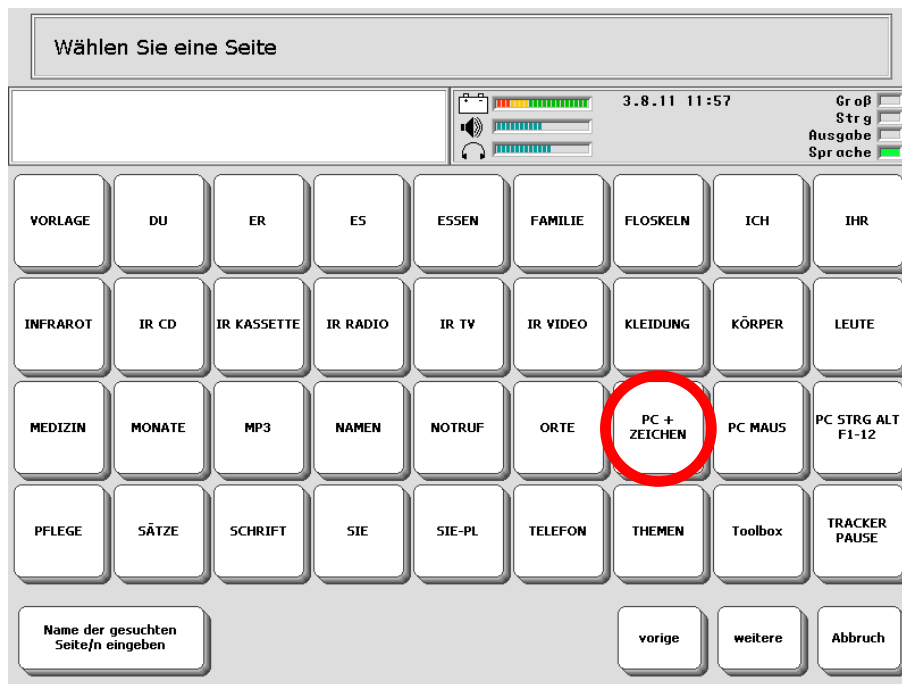


10. Verlassen Sie das Menü mit <OK>

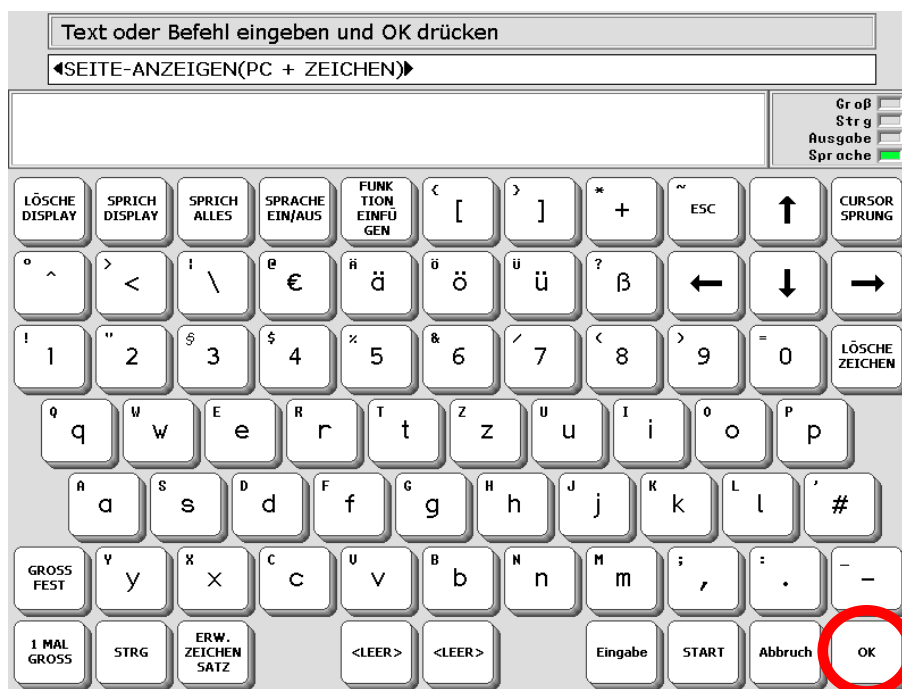

11. <Name ändern >

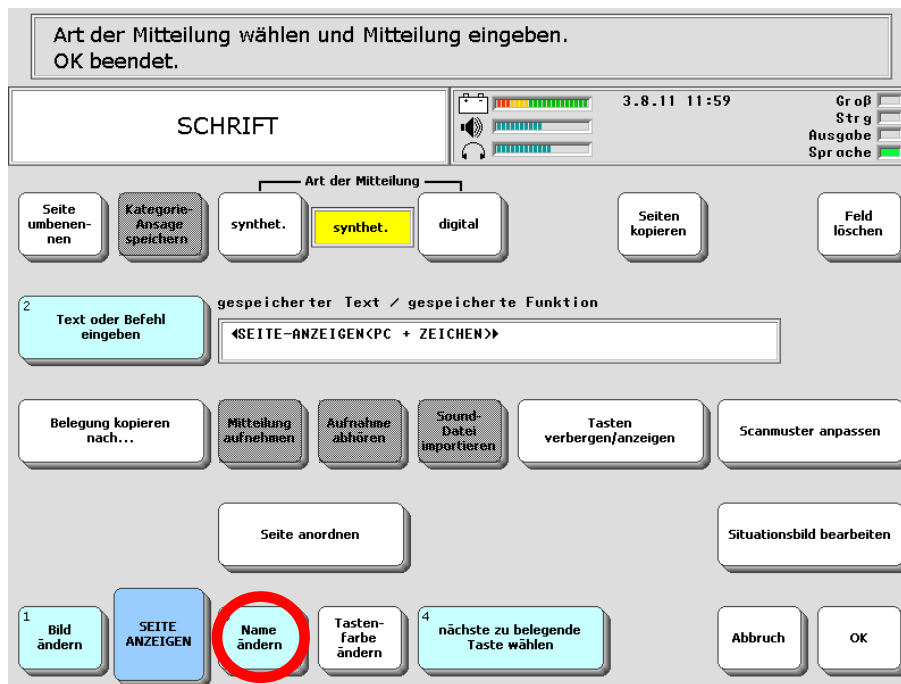

12. Schreiben Sie „PC + Zeichen“

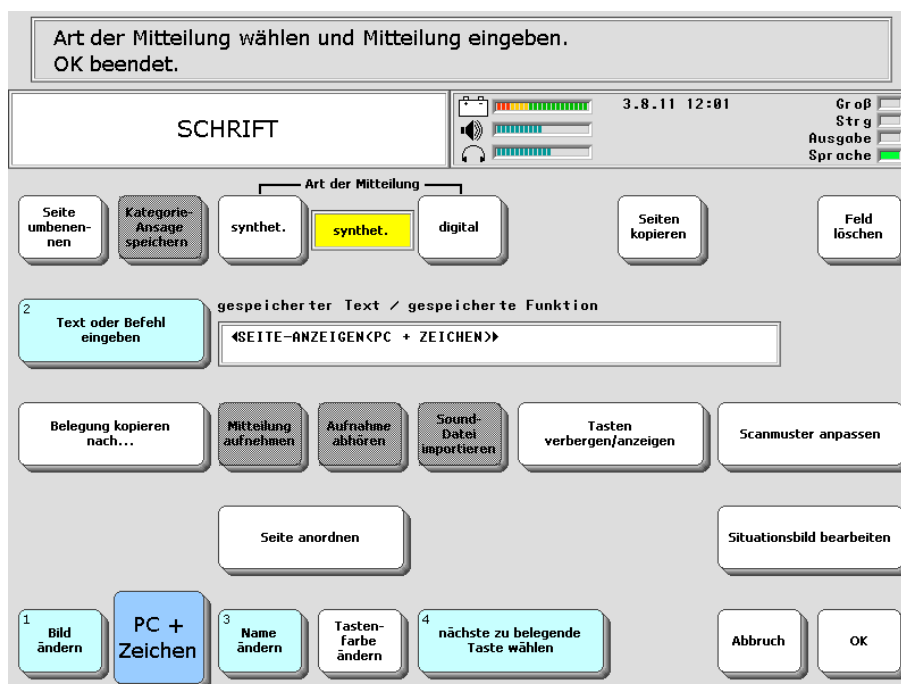


13. Verlassen Sie das Menü mit <OK>

14. Die hellblaue Taste <START> in der Toolbox bringt Sie wieder zurück zur Startseite SCHRIFT des Programms.

Ausführliche Informationen zum Thema PC-Ansteuerung mit dem Talker finden Sie in der Bedienungsanleitung im Kapitel „Computeransteuerung“. Dort finden Sie auch Hinweise auf die jeweiligen Einstellungen für Bluetooth- oder USB-Verbindungen.

Toolbox öffnen

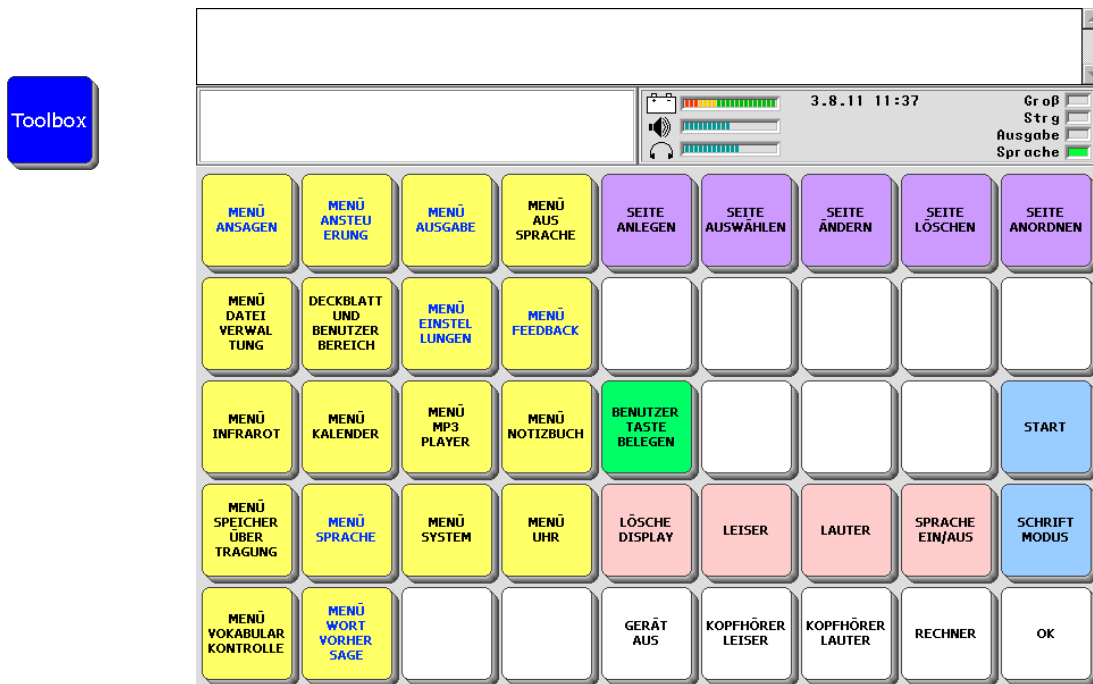

Die blaue Toolbox-Taste auf der THEMEN-SEITE erfüllt dieselbe Funktion wie die Taste



auf dem Gehäuse über dem Display.

Auf diesem Weg können auch Benutzer, die den Talker im Scanningverfahren oder mit Hilfe eines Trackers bedienen, die Toolbox erreichen.


Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Ansteuerungsoptionen finden Sie im Kapitel „Die Ansteuerungstechniken“ in der Bedienungsanleitung.


Eine letzte Anregung: Speicherübertragung durchführen

Sichern Sie regelmäßig das „ABC 45“-Programm mit Ihren persönlichen Änderungen, damit Sie im Falle eines Datenverlustes (auch der Talker ist ein Computer!) eine Sicherungskopie Ihres Vokabulars in das Gerät zurück laden können.


Benutzerbereich sichern

Schließen Sie den mitgelieferten USB-Stick an den Talker an (rechte Gehäusesseite oben).


Öffnen Sie die Toolbox  und wählen Sie das <MENÜ SPEICHERÜBERTRAGUNG>

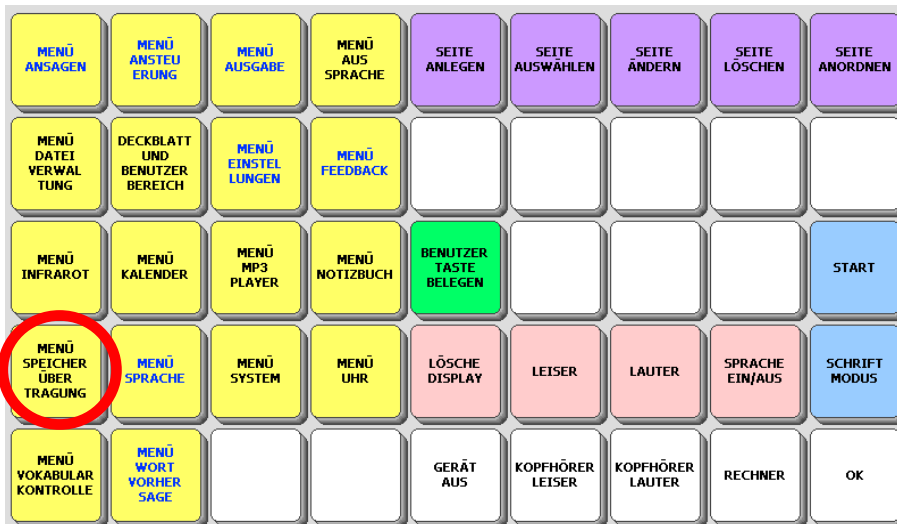

Im Feld „Übertragen von/nach“ sollte <AUTO> stehen. Tippen Sie auf das Feld <Benutzerbereich sichern>

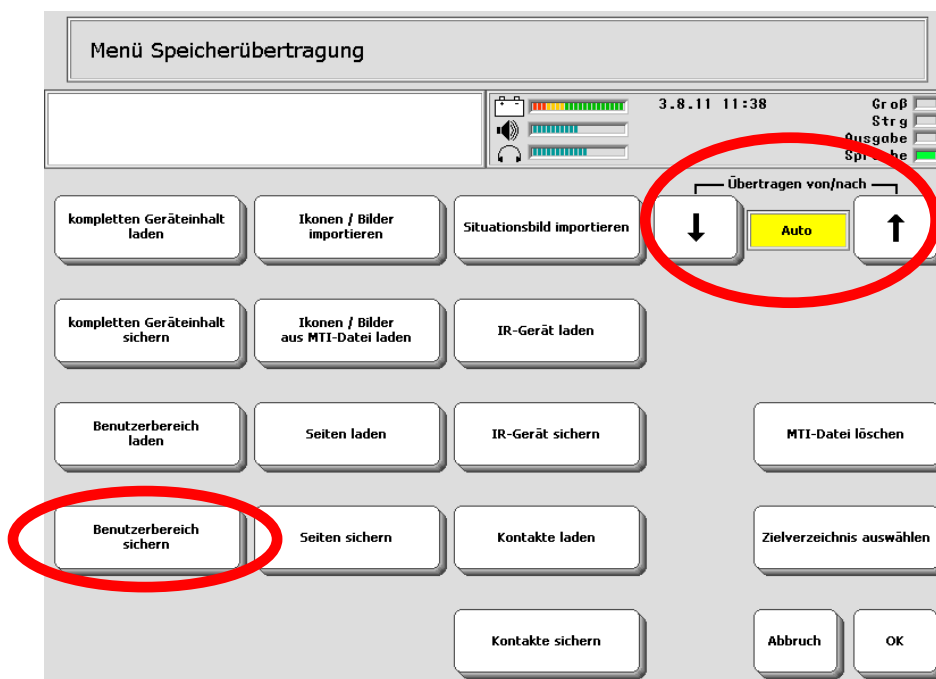


Wählen Sie <ABC 45 neu> als zu sichernden Bereich aus.

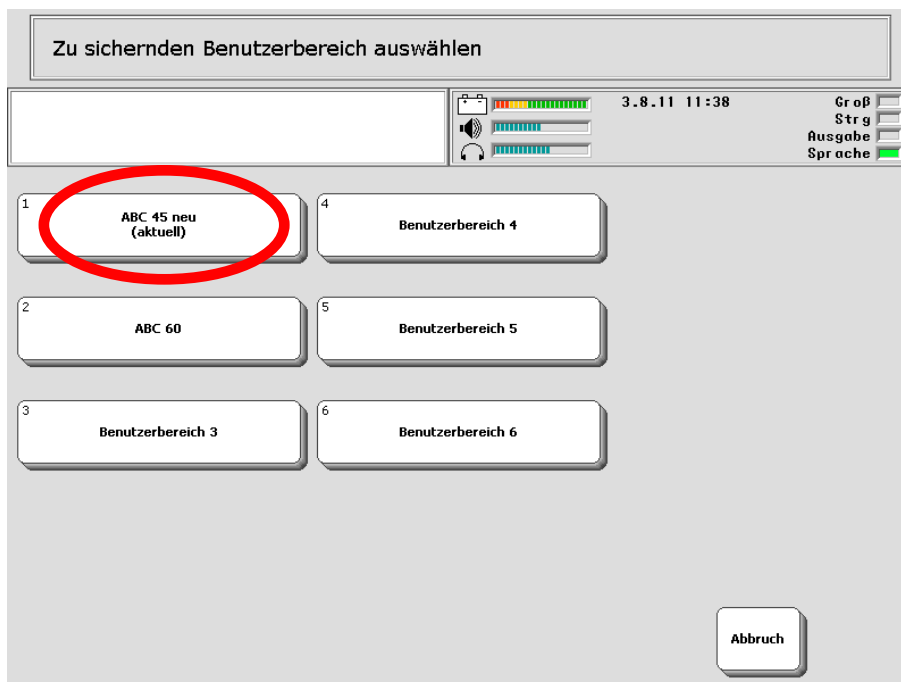

Auf der Schrifftastatur, die dann erscheint, geben Sie einen Dateinamen ein z.B. „ABC45 + Datum der Datensicherung“: „ABC45 2011-08-01“ Bestätigen Sie die Eingabe mit <OK>.

Wenn die Speicherübertragung beendet ist, erscheint eine entsprechende Meldung im Display:

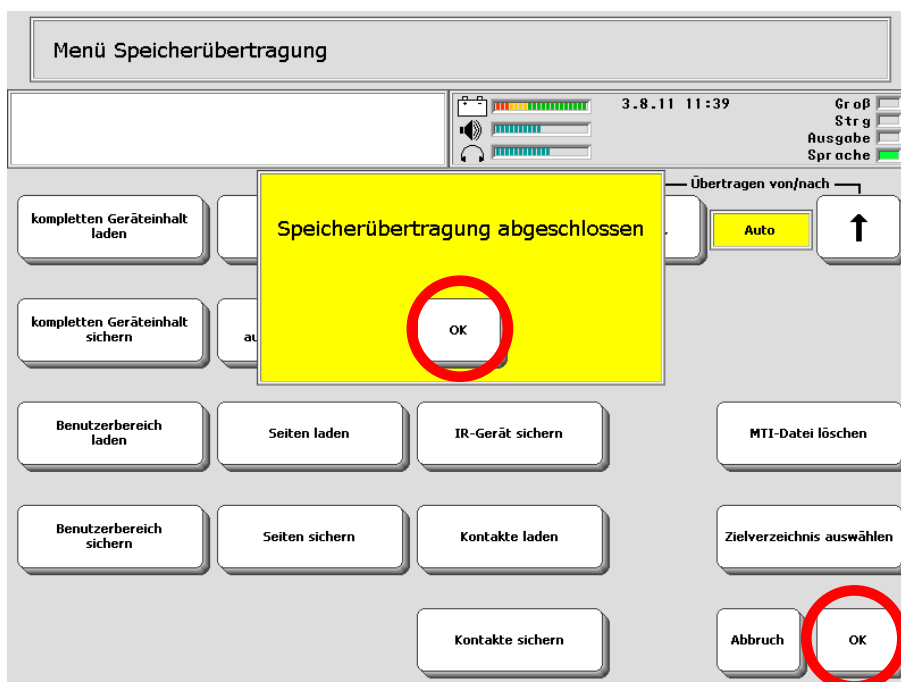


Drücken Sie <OK> im gelben Feld und danach <OK>, um das Menü zu beenden. Die hellblaue Taste <START> in der Toolbox bringt Sie wieder zurück zur Startseite SCHRIFT des Programms.

Benutzerbereich laden

Wenn Sie eine Datei vom USB-Stick zurück in den Talker laden möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. USB-Stick an den Talker anschließen
2. Toolbox öffnen
3. <Menü Speicherübertragung>
4. <Benutzerbereich laden>
5. Benutzerbereich auswählen, in den die Datei geladen werden soll
6. Es erscheint ein gelbes Feld mit einer Abfrage:

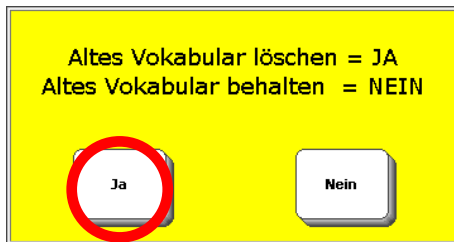


7. Wählen Sie <JA>
8. Die auf dem USB-Stick vorhandenen Dateien werden angezeigt
9. Wählen Sie die zu ladende Datei aus
10. Die Speicherübertragung wird durchgeführt
11. Drücken Sie <OK> im gelben Feld und danach <OK>, um das Menü zu beenden.
12. <START> bringt Sie zurück zum Start des Programms.


Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Talker!

ABC 60

Die SCHRIFT-SEITE

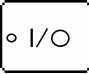Schalten Sie den Talker mit der linken Taste  über dem Display ein.

Die Lampe auf der Taste  leuchtet jetzt und im Display erscheint folgendes Bild:

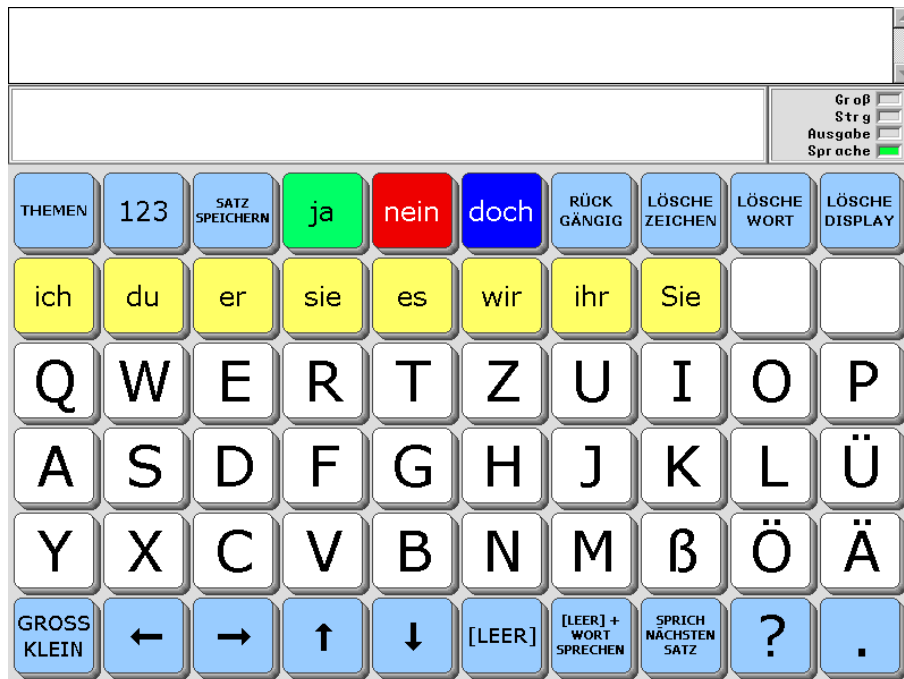

Die oberste Zeile, die im Augenblick noch leer ist, heißt Textfenster. Hier erscheinen im Folgenden die Buchstaben und Wörter, die Sie schreiben.

In der Zeile darunter erscheinen die Vorschläge der Wortvorhersage, sobald Sie zu schreiben beginnen.

Die Buchstaben auf der SCHRIFT-SEITE sind angeordnet wie auf einer Computertastatur.

Sie können sofort mit dem Schreiben beginnen.

Tippen Sie z.B. nacheinander die einzelnen Buchstaben h a l l o und am Ende die Taste <leer> ganz oben links.

(Stören Sie sich bitte nicht daran, dass der Talker die einzelnen Buchstaben laut ausspricht. Das liegt daran, dass die Sprache eingeschaltet ist. Wie man die Sprachausgabe ein- und ausschalten kann, erfahren Sie bei den Erläuterungen zur THEMEN-SEITE weiter hinten in dieser Einführung.)

Im Textfenster in der oberen Zeile erscheint das Wort „hallo“.


Tippen Sie auf das angezeigte Wort „hallo“, und der Talker spricht das ganze Wort.

Gelbe Tasten

Außer den Buchstaben befinden sich auf der SCHRIFT-SEITE gelbe Tasten mit den Wörtern <ich>, <du>, <er>, <sie>, <es>, <wir>, <ihr> und <Sie>. Diese Tasten öffnen jeweils eine Seite mit häufig benötigten Satzanfängen und Fragen.

Drücken Sie die Taste <ich>.

Es öffnet sich die ICH-SEITE mit Phrasen und Fragen, in denen das Wort „ich“ vorkommt.

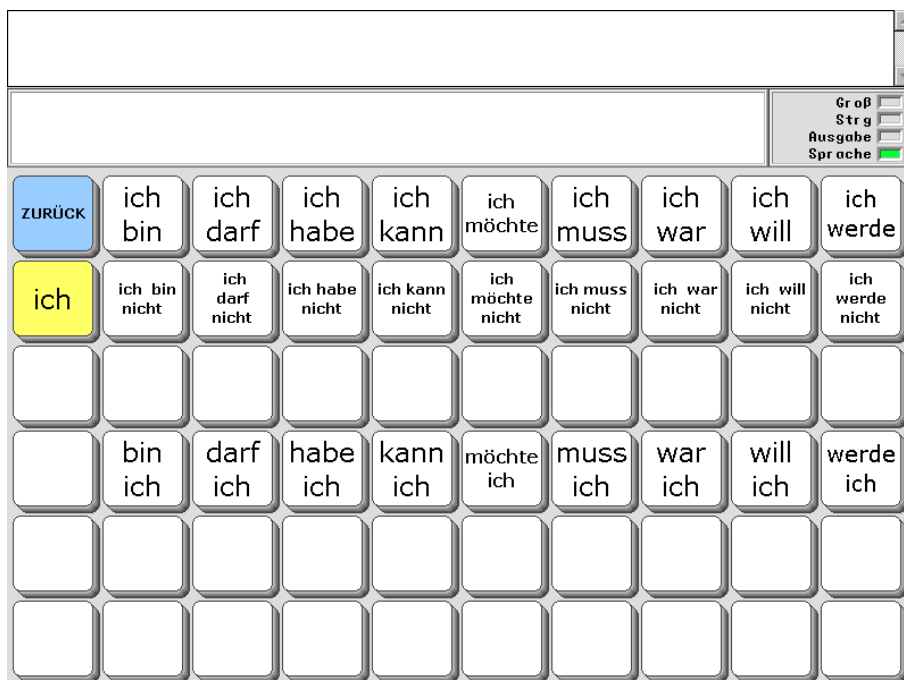

Tippen Sie auf das Feld <ich bin>.

Im Textfenster erscheinen jetzt die Wörter „ich bin“ und die Anzeige wechselt zurück zur SCHRIFT-SEITE mit der Buchstabentastatur. Tippen Sie ein Wort Ihrer Wahl, um den Satz zu vollenden und drücken Sie danach direkt auf die Schrift im Textfenster, um den Satz im Zusammenhang sprechen zu lassen.

Die gelben Tasten <du>, <er>, <sie>, <es>, <wir>, <ihr> und <Sie> öffnen Seiten, die nach dem selben Muster aufgebaut sind wie die ICH-SEITE.

Blaue Funktionstasten

Auf der SCHRIFT-SEITE befinden sich auch einige blau unterlegte Tasten mit Funktionen, die beim Schreiben wichtig sind:



Wechsel zur ZEICHEN-SEITE



Ermöglicht das Speichern der gerade eingegebenen Aussage auf einer Seite



Macht die letzte Eingabe rückgängig



Zeichen löschen




Wort löschen



Inhalt des Textfensters löschen



Wechsel zwischen großen und kleinen Buchstaben

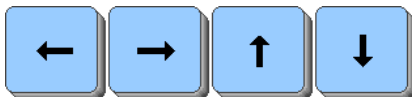

Tasten zum Verschieben der Schreibmarke (Cursor)



Leerzeichen



Leerzeichen und zuletzt eingegebenes Wort sprechen




Zum Vorlesen des nächsten Satzes (z. B. in Notizbüchern)

Die ZEICHEN-SEITE

123

Drücken Sie auf der SCHRIFT-SEITE die Taste mit dem Punkt:

Die Anzeige im Display wechselt und Sie sehen nun die ZEICHEN-SEITE:

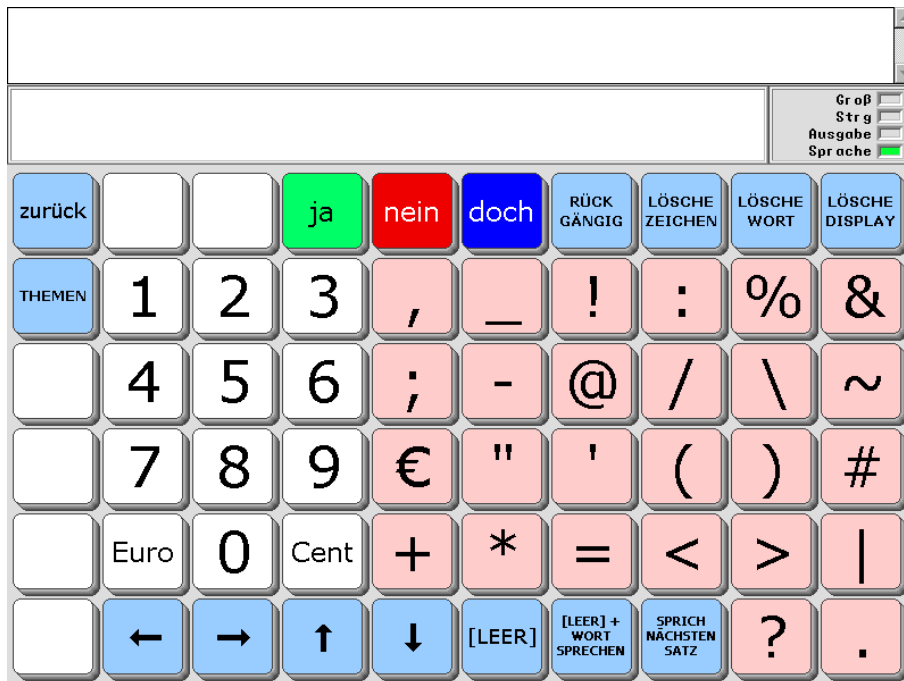


Wenn Sie auf der ZEICHEN-SEITE eine rosa eingefärbte Taste (z.B. Punkt oder Fragezeichen) drücken, springt die Anzeige automatisch wieder zurück zur SCHRIFT-SEITE.



Bei den Ziffern und den Pfeiltasten bleibt die ZEICHEN-SEITE so lange stehen, bis Sie sie durch Drücken der Zurück-taste oben links aktiv verlassen.


Wortvorhersage

Der Talker verfügt über eine leistungsfähige Wortvorhersage mit über 20.000 Wörtern. Beim Schreiben erscheinen unterhalb des Textfensters orange hinterlegte Wortvorschläge, die Sie durch direktes Antippen auswählen können, um den Schreibprozess abzukürzen.

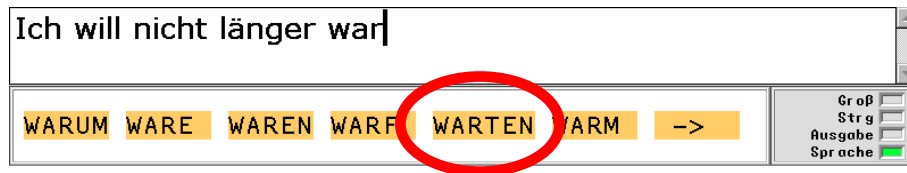

Falls Sie den Talker nicht direkt über das Display, sondern im Scanning-Modus mit einer externen Taste bedienen, können Sie im Menü ANSTEUERUNG – SCANMUSTER ANPASSEN – STANDARD-SCANMUSTER ANPASSEN einstellen, wann der Talker die die Vorschläge aus der Wortvorhersage scannt.

Ein- und Ausschalten sowie Anpassen können Sie die Wortvorhersage über die Toolbox, Menü Wortvorhersage.

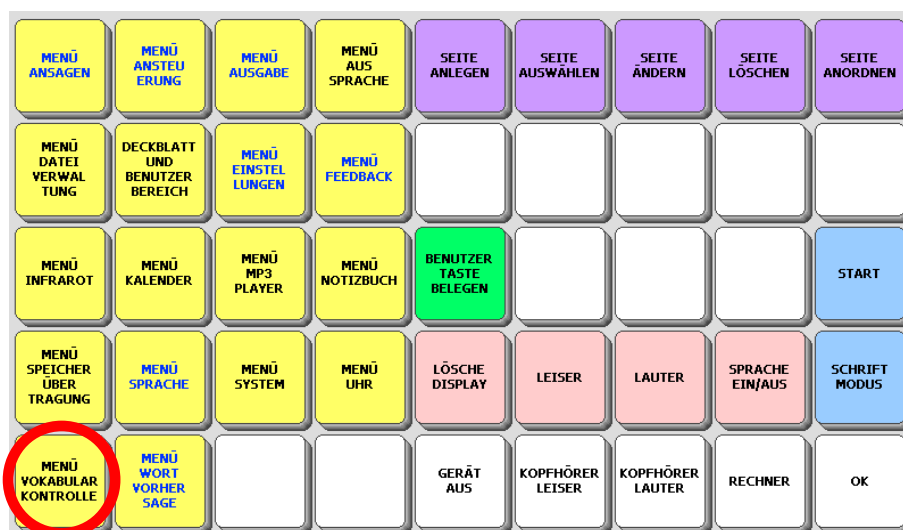


Wie Sie neue Wörter in das Wortvorhersage-Lexikon einfügen können, lesen Sie bitte in dem Heft „Das kleine Handbuch“, das Sie mit dem Talker erhalten haben.

Die THEMEN-SEITEN

Zusätzlich zu den Möglichkeiten der Schrifteingabe bietet der Talker auch die Funktion, Wörter und Sätze, die man häufig benötigt, als Ganzes abzuspeichern, damit man sie nicht jedes Mal wieder schreiben muss.



Drücken Sie die Taste Themen auf der SCHRIFT-SEITE.
Die Anzeige im Display wechselt und Sie sehen die THEMEN-SEITE:

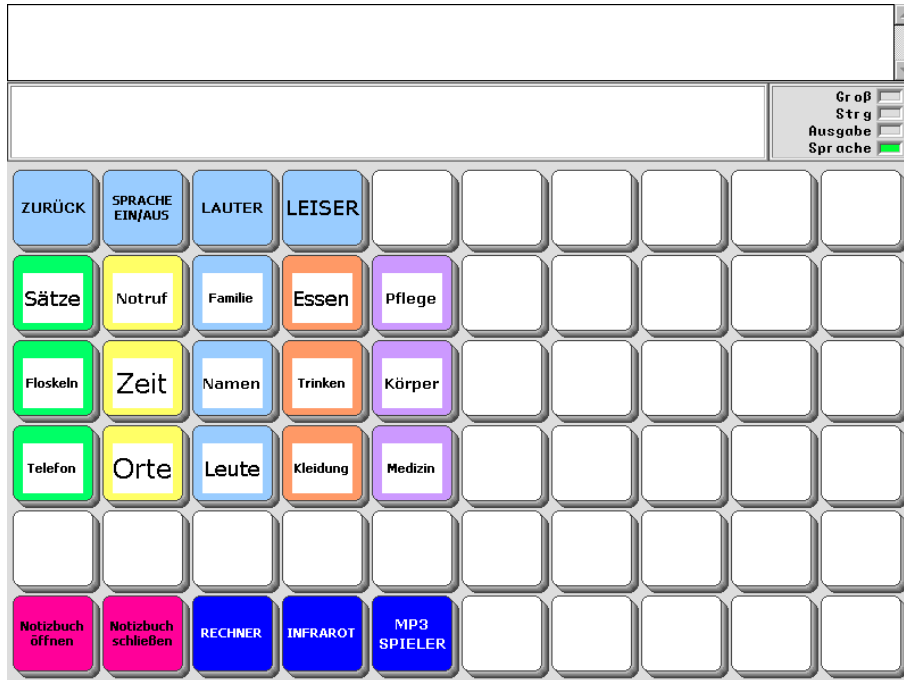

In der oberen Zeile befinden sich hellblau hinterlegt folgende Funktionen:



Wechsel zurück zur SCHRIFT-SEITE



Sprache ein / aus: Wenn die Sprachausgabe eingeschaltet ist, spricht der Talker nach jeder Eingabe (z.B. nach jedem Buchstaben). Ist die Sprache ausgeschaltet, spricht der Talker erst, wenn Sie auf die Schrift im Textfenster drücken.



Sprachausgabe lauter



Sprachausgabe leiser

Die Tasten in den Zeilen 2 – 4 öffnen Seiten zu verschiedenen Themenbereichen, die Sie individuell verändern können (weiter hinten in dieser Einführung wird die entsprechende Vorgehensweise erläutert). Auf den Tasten steht jeweils der Name der damit zu öffnenden Seite.



Die Seiten sind alle nach derselben Struktur aufgebaut. Die Mehrzahl taste ist nur aktiv, wenn von einem einzelnen Wort die Mehrzahl gebildet werden kann, z.B. bei den Kleidungsstücken oder den Lebensmitteln.

Im Folgenden sind alle Themenseiten abgebildet.

Die Seite SÄTZE



									Groß Strg Ausgabe Sprache
ZURÜCK	MEHRZAHL		ja	nein	doch	RÜCK GÄNGIG	LÖSCHE ZEICHEN	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
THEMEN	Ich möchte mich ausruhen!								
	Wann ist mein nächster Termin?								

Die Seite FLOSKELN



									Groß Strg Ausgabe Sprache
ZURÜCK	MEHRZAHL		ja	nein	doch	RÜCK GÄNGIG	LÖSCHE ZEICHEN	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
THEMEN	bitte	danke	Ent- schuldigung						
	Hallo	Guten Tag!	Tschüss						
	Herzlichen Glückwunsch	Alles Gute!	Veihnachter						

Die Seite TELEFON



										<input type="checkbox"/> Groß <input type="checkbox"/> Strg <input type="checkbox"/> Ausgabe <input checked="" type="checkbox"/> Sprache
ZURÜCK			ja	nein	doch	RÜCK GÄNGIG	LÖSCHE ZEICHEN	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY	
THEMEN			OK	ja	nein	danke	Auf Wiederhören	Hallo!		
	Hier spricht	Sprach Computer	Bitte ja/nein-Fragen stellen	Moment bitte, ich schreibe		Ihre Fax Nummer	Ihre Tel. Nummer	Ihre Handy Nummer		
	Bitte wiederholen Sie	Bitte erklären	Ich habe nicht verstanden	Ich habe verstanden		Meine Fax Nummer	Meine Tel. Nummer	Meine Handy Nummer		
	Wie ist Ihr Name?	Ich möchte sprechen mit				Schicken Sie mir bitte ein Fax	Bitte später wieder anrufen	Ich werde ein Fax schicken		

Die Seite NOTRUF



										<input type="checkbox"/> Groß <input type="checkbox"/> Strg <input type="checkbox"/> Ausgabe <input checked="" type="checkbox"/> Sprache
ZURÜCK			ja	nein	doch	RÜCK GÄNGIG	LÖSCHE ZEICHEN	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY	
THEMEN	Ich brauche Hilfe!	Mein Name ist	Ich wohne in	Telefon						

Die Seite ZEIT



Mit der dunkel-blauen Taste MONATE wechseln Sie auf die Seite MONATE, die nur für eine Auswahl geöffnet bleibt.

										Größ Strg Ausgabe Sprache
ZURÜCK	[LEER]	MEHRZAHL	ja	nein	doch	RÜCK GÄNGIG	LÖSCHE ZEICHEN	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY	
THEMEN	halb	Viertel	vor	nach	Uhr	früher	später	um	ab	
1	2	3	4	5	6	Minute	Stunde	Tag	Wochen- ende	
7	8	9	10	11	12	Woche	Monat	Jahr	Monate	
Montag	Dienstag	Mitt woch	Donners- tag	Freitag	Samstag	Sonntag		November	Dezember	
Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	

Die Seite MONATE



Die MONATE-SEITE erreichen Sie über die dunkelblaue Taste auf der ZEIT-SEITE.

Die MONATE-SEITE öffnet sich jeweils nur für eine Auswahl.

										Größ Strg Ausgabe Sprache
zurück	Mehrzahl			ja	nein		lösche Zeichen	lösche Wort	lösche Display	
Themen	Jan	Feb	März							
	April	Mai	Juni							
	Juli	Aug	Sept							
	Okt	Nov	Dez							

Die Seite ORTE



The screenshot shows the 'ORTE' page interface. At the top, there is a search bar and a settings panel with options for 'Groß', 'Strg', 'Ausgabe', and 'Sprache' (checked). Below the settings is a row of navigation buttons: 'ZURÜCK' (blue), 'MEHRZAHL' (orange), a blank white button, 'ja' (green), 'nein' (red), 'doch' (blue), 'RÜCK GÄNGIG' (blue), 'LÖSCHE ZEICHEN' (blue), 'LÖSCHE WORT' (blue), and 'LÖSCHE DISPLAY' (blue). The main area is a grid of buttons. The first row contains 'THEMEN' (blue), 'Apotheke', 'Bäcker', 'Bahnhof', 'Bank', and 'Geschäft'. The second row contains 'Kino', 'Kiosk', 'Kirche', 'Markt', and 'Metzger'. The third row contains 'Park', 'Post', 'Supermarkt', and 'Tankstelle'. The remaining buttons in the grid are blank.

Die Seite FAMILIE



The screenshot shows the 'FAMILIE' page interface. It has the same search bar and settings panel as the 'ORTE' page. The navigation buttons are identical. The main grid of buttons starts with 'THEMEN' (blue) in the first row. The rest of the grid consists of blank buttons.

Die Seite NAMEN



									Groß Strg Ausgabe Sprache
ZURÜCK	MEHRZAHL		ja	nein	doch	RÜCK GÄNGIG	LÖSCHE ZEICHEN	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
THEMEN									

Die Seite LEUTE



									Groß Strg Ausgabe Sprache
ZURÜCK	MEHRZAHL		ja	nein	doch	RÜCK GÄNGIG	LÖSCHE ZEICHEN	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
THEMEN	Frau	Mann	Besuch	Nachbar					
	Mädchen	Junge	Kind	Baby					

Die Seite ESSEN



									Groß Strg Ausgabe Sprache
ZURÜCK	Mehrzahl		ja	nein	doch	RÜCK GÄNGIG	LÖSCHE ZEICHEN	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
THEMEN	Apfel	Banane	Brot	Butter	Fleisch				
	Gemüse	Joghurt	Käse	Kartoffel	Keks				
	Kuchen	Marmelade	Nudeln	Pizza	Salat				

Die Seite TRINKEN



									Groß Strg Ausgabe Sprache
ZURÜCK	MEHRZAHL		ja	nein	doch	RÜCK GÄNGIG	LÖSCHE ZEICHEN	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY
THEMEN	Becher	Cola	Flasche	Glas	Kaffee				
	Kakao	Limo nade	Milch	Mineral wasser	Saft				
	Stroh halm	Tasse	Tee	Wasser	Zucker				

Die Seite KLEIDUNG



										<input type="checkbox"/> Groß <input type="checkbox"/> Strg <input type="checkbox"/> Ausgabe <input checked="" type="checkbox"/> Sprache
ZURÜCK	MEHRZAHL		ja	nein	doch	RÜCK GÄNGIG	LÖSCHE ZEICHEN	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY	
THEMEN										
	Halstuch	Hemd	Hose	Jacke		rot	gelb	grün		
	Kleid	Pullover	Rock	Schuh		blau	schwarz	weiß		
	Socke	Strumpf hose	T-Shirt	Unter wäsche		braun	grau	bunt		

Die Seite PFLEGE



										<input type="checkbox"/> Groß <input type="checkbox"/> Strg <input type="checkbox"/> Ausgabe <input checked="" type="checkbox"/> Sprache
ZURÜCK	MEHRZAHL		ja	nein	doch	RÜCK GÄNGIG	LÖSCHE ZEICHEN	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY	
THEMEN	Badewanne	Deo	Dusche	Fön	Handtuch					
	Kamm	Klo	Klopapier	Make-up	Seife					
	Shampoo	Wasch becken	Wasch lappen	Zahn bürste	Zahnpasta					

Die Seite KÖRPER



Mit der dunkelblauen Taste MEDIZIN können Sie direkt von der KÖRPER-SEITE zur MEDIZIN-SEITE wechseln.

										<input type="checkbox"/> Groß <input type="checkbox"/> Strg <input type="checkbox"/> Ausgabe <input checked="" type="checkbox"/> Sprache
ZURÜCK	MEHRZAHL		ja	nein	doch	RÜCK GÄNGIG	LÖSCHE ZEICHEN	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY	
THEMEN	Arm	Bauch	Bein	Fuß	Hals					
	Hand	Herz	Hüfte	Kopf	Magen					
	Nase	Ohr	Rücken	Schmerz	Zahn					

Die Seite MEDIZIN



Mit der dunkelblauen Taste KÖRPER können Sie direkt von der MEDIZIN-SEITE zur KÖRPER-SEITE wechseln.

										<input type="checkbox"/> Groß <input type="checkbox"/> Strg <input type="checkbox"/> Ausgabe <input checked="" type="checkbox"/> Sprache
ZURÜCK	MEHRZAHL		ja	nein	doch	RÜCK GÄNGIG	LÖSCHE ZEICHEN	LÖSCHE WORT	LÖSCHE DISPLAY	
THEMEN	Ich brauche ein Rezept	Arzt	Brille	Ergo therapie	Gehhilfe					
	Hörgerät	Kranken gymnastik	Logo	Pflaster	Rollator					
	Salbe	Spritze	Tablette	Talker	Zahnarzt					


Eigene Änderungen einfügen


Bevor wir zu den Sonderfunktionen in der unteren Zeile der THEMEN-SEITE kommen, erfahren Sie, wie Sie eigene Änderungen in das Programm „ABC 60“ einfügen können.

Seiten ändern


Das Programm „ABC 60“ ist aus einzelnen Seiten zusammengesetzt. Um Änderungen vorzunehmen, werden Sie hauptsächlich die lila Tasten in der oberen Reihe der Toolbox benötigen.

Wie Sie Seiten ändern können, wird im Folgenden Schritt für Schritt am Beispiel der NOTRUF-SEITE erläutert:

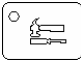
Drücken Sie die Taste  über dem Display, um die Toolbox zu öffnen.
Drücken Sie die Taste SEITE ÄNDERN

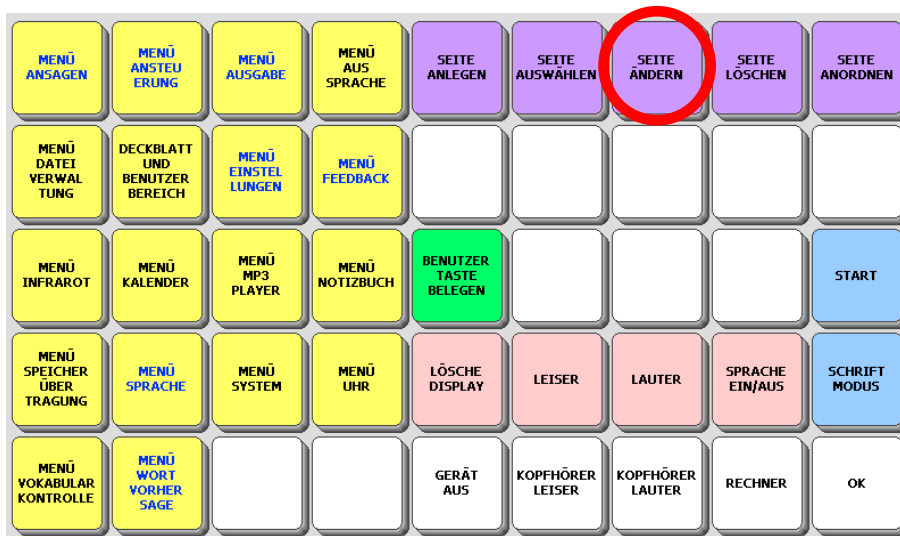

Wählen Sie die zu ändernde Seite aus: NOTRUF

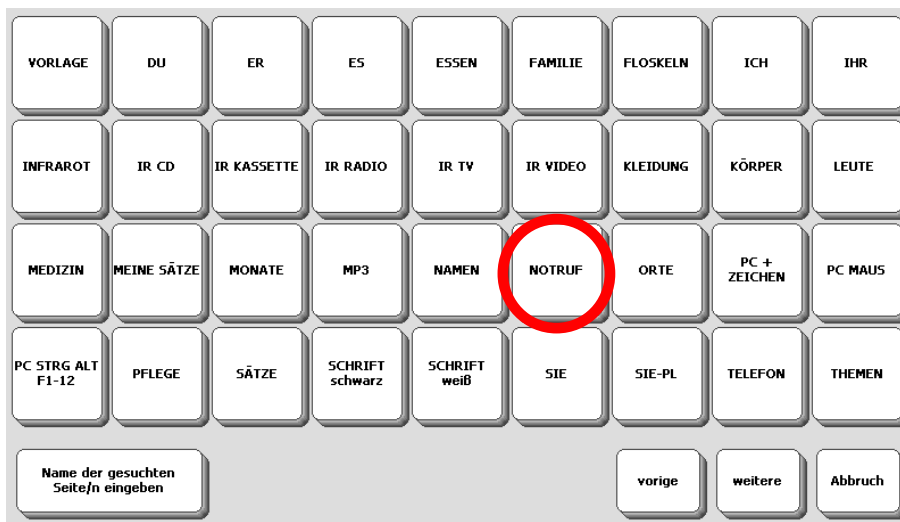


Im Display erscheint die NOTRUF-SEITE und links im Textfenster steht die Aufforderung: „Taste auswählen“.

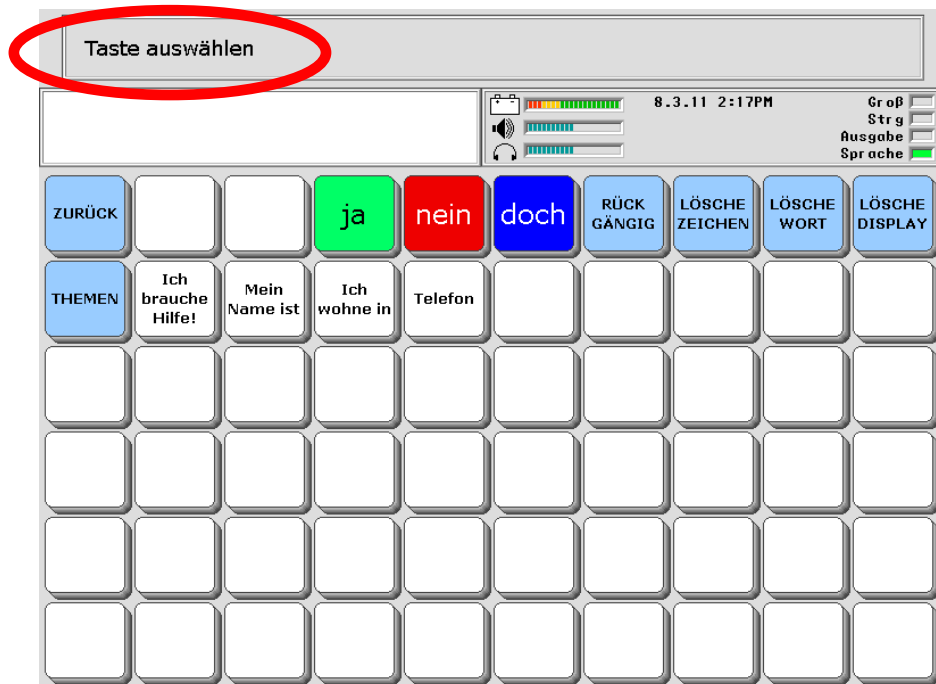


Auf der NOTRUF-SEITE müssen Ihr Name, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer ergänzt werden.

Wählen Sie zuerst die Taste <Mein Name ist>

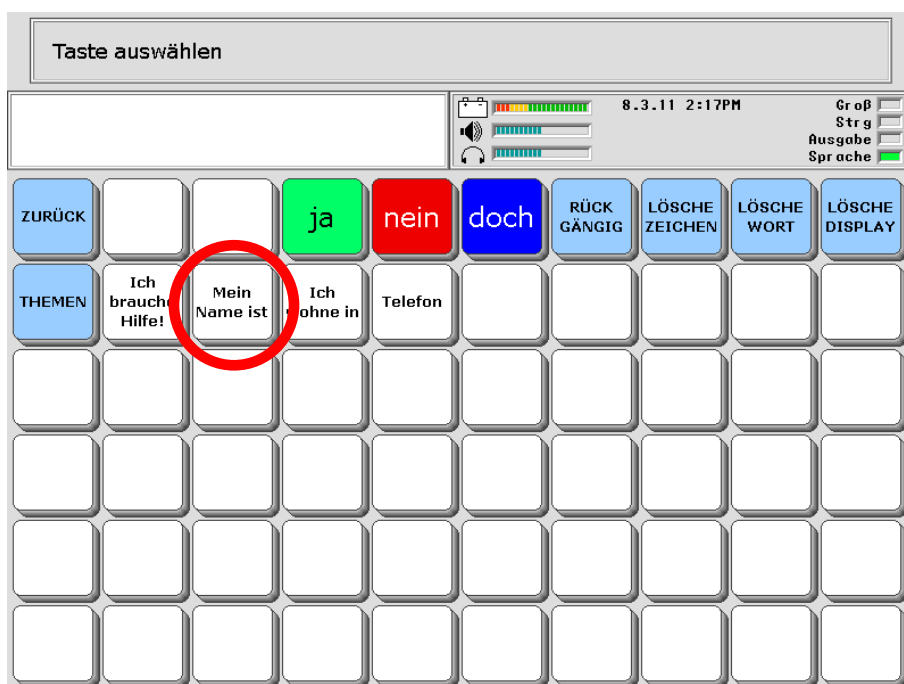


Sie sehen folgende Anzeige:

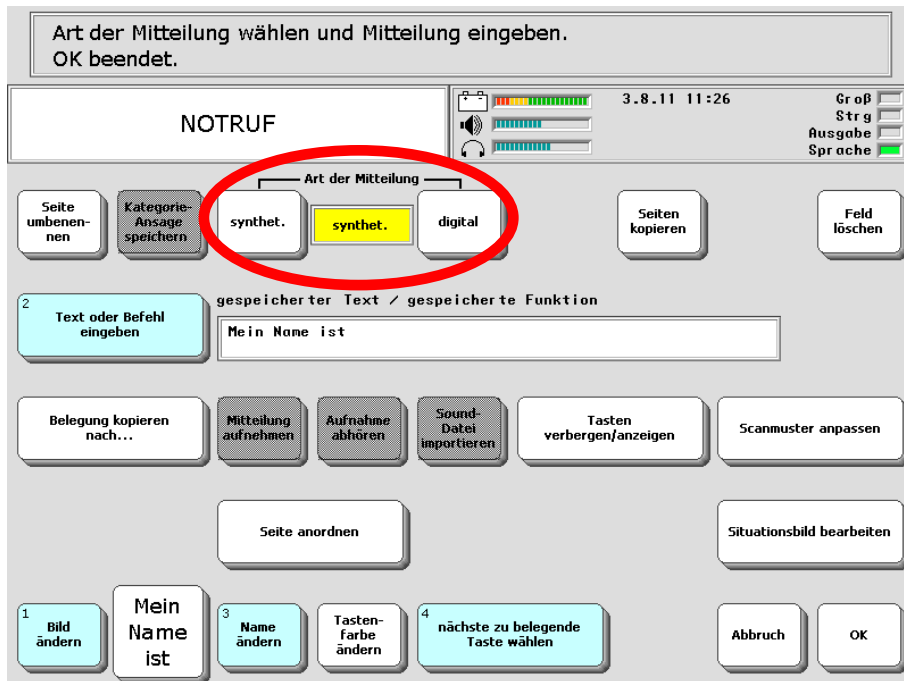


Im gelben Feld oben in der Mitte steht für „Art der Mitteilung = synthet.“. Das bedeutet, dass die Mitteilung mit der Computerstimme des Talkers gesprochen wird.

Darunter sehen Sie:

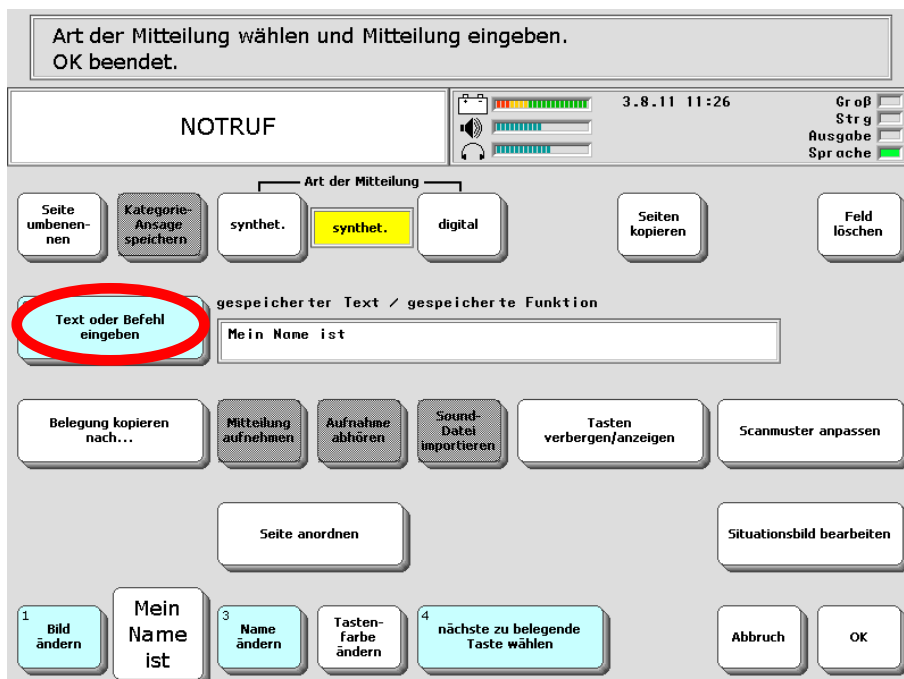

Drücken Sie <Text oder Befehl eingeben>.

Mit Hilfe der Buchstabentastatur, die dann erscheint, können Sie Ihren Namen eingeben.

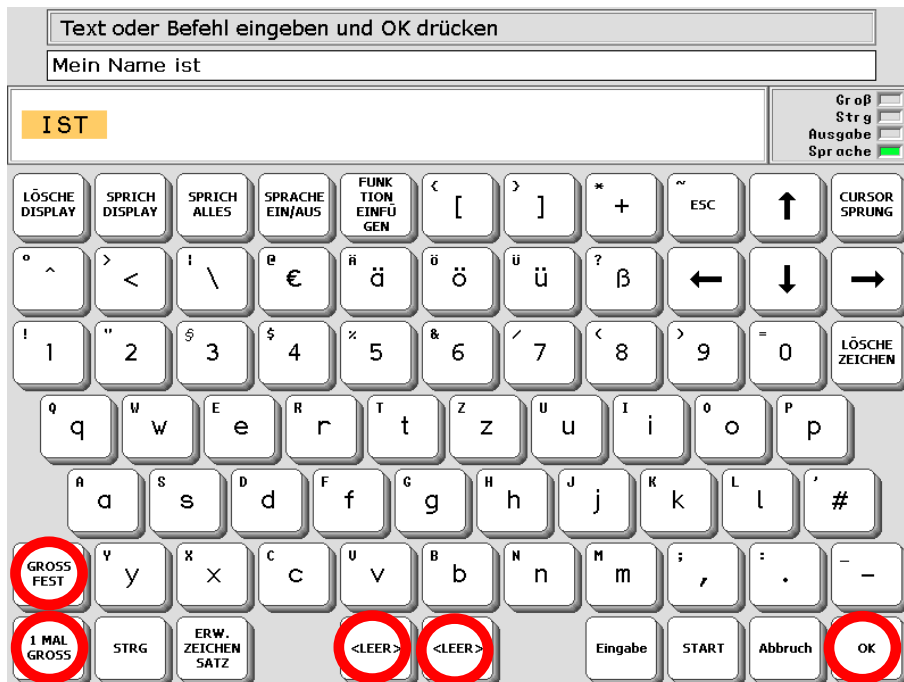


Mit den beiden Tasten unten links können Sie die Groß- und Kleinschreibung verändern.

Nach Ihrem Namen machen Sie bitte ein Leerzeichen (unten Mitte).

Beenden Sie die Eingabe mit <OK> (unten rechts).

Die Anzeige im Display springt zurück und Sie sehen den ergänzten Text:

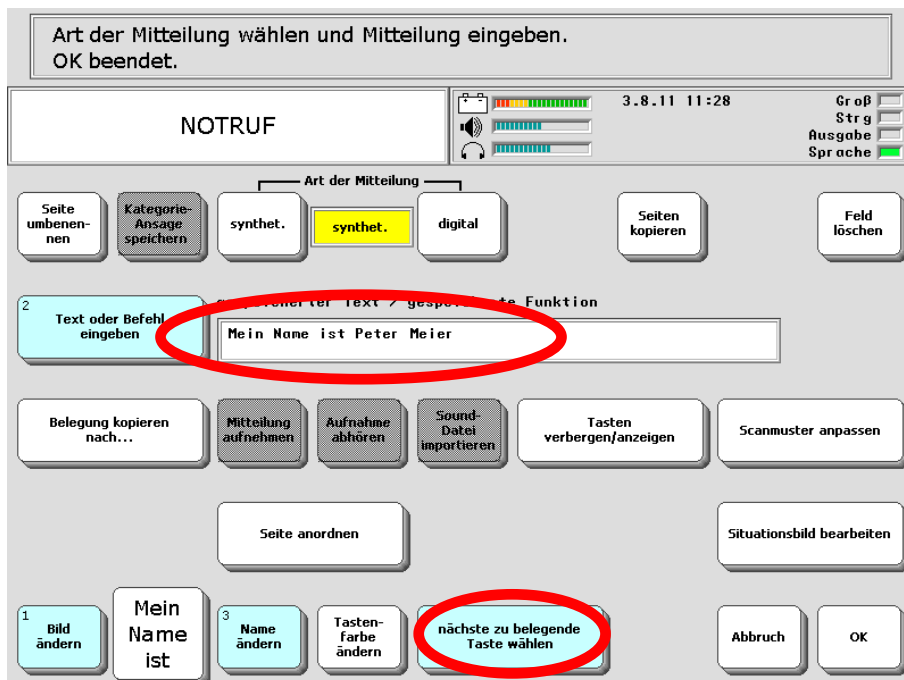


Um auch die Angaben auf den Tasten <Ich wohne in> und <Telefon> zu ergänzen, drücken Sie das Feld <nächste zu belegende Taste wählen> und verfahren Sie wie im vorangegangenen Beispiel.

Felder, auf denen noch nichts gespeichert ist, können Sie selbst belegen, indem Sie einen eigenen Text eingeben.


Wenn der Text zu lang ist, um auf der Taste angezeigt zu werden, wählen Sie die Funktion <Name ändern> und geben dort nur ein Stichwort als Merkhilfe ein.

Wenn Sie auf der Taste ein Bild hinzufügen möchten, gelangen Sie mit der Funktion <Bild ändern> in das Bildarchiv des Talkers. Standardmäßig enthält der Talker im Modus „ABC-Programme“ keine Bilder. Um Bilder zu verwenden:

3. Erwerben Sie einen der optional erhältlichen Symbolsätze PCS oder METACOM.
4. Importieren Sie eigene Bilder in den Talker (siehe Handbuch).

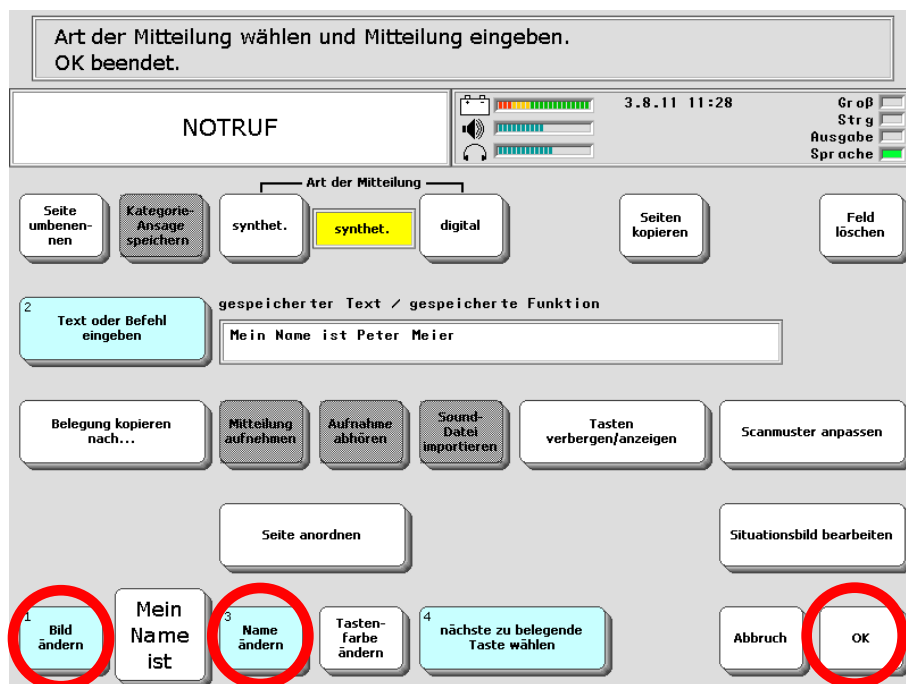

Nachdem Sie Ihre persönlichen Änderungen eingefügt haben, beenden Sie das Menü mit <OK> (unten rechts). Es erscheint wieder die Toolbox.

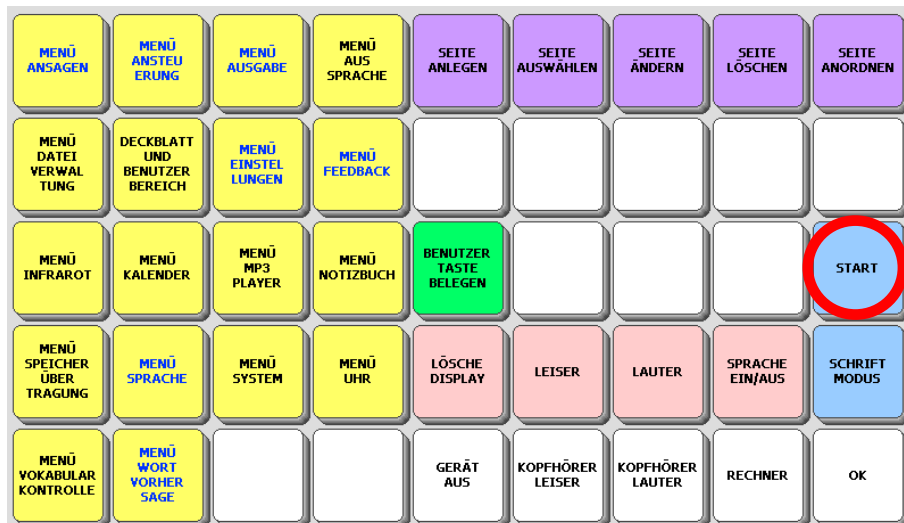

Die hellblaue Taste <START> bringt Sie zurück zum Ausgangsseite SCHRIFT des Programms „ABC 60“.

Ausführliche Informationen zum Thema „Seiten“ entnehmen Sie bitte dem Heft „Das kleine Handbuch“, das Sie mit dem Talker erhalten haben oder der Bedienungsanleitung im Kapitel „Das persönliche Deckblatt / Seiten“.

Aussprache korrigieren

Besonders bei Namen von Personen und Orten kann es vorkommen, dass der Talker den Namen mit der synthetischen Stimme nicht so ausspricht, wie Sie es gerne hätten. In diesem Fall sollten Sie das betreffende Wort zum Aussprache-Lexikon hinzufügen, damit der Talker lernt, den Begriff richtig auszusprechen.



Wie Sie neue Wörter in das Aussprache-Lexikon einfügen können, entnehmen Sie bitte dem Heft „Das kleine Handbuch“, das Sie mit dem Talker erhalten haben.

Besondere Funktionen des Talkers

Die untere Zeile auf der THEMEN-SEITE bezieht sich auf spezielle Möglichkeiten des Talkers, die im Folgenden vorgestellt werden.




Notizbücher


Wenn Sie längere Texte verwalten möchten, können Sie dafür die NOTIZBUCH-Funktionen des Talkers benutzen. Wir haben im Programm „ABC 60“ bereits 6 Notizbücher angelegt, die Sie mit den pink hinterlegten Tasten <NB öffnen> und <NB schließen> von der THEMEN-SEITE aus direkt benutzen können.

Dass ein Notizbuch geöffnet ist, erkennen Sie an dem grün hinterlegten Textfenster.

Wie Sie die Notizbücher umbenennen oder neue anlegen, erfahren Sie in der Bedienungsanleitung im Kapitel „Notizbücher“.

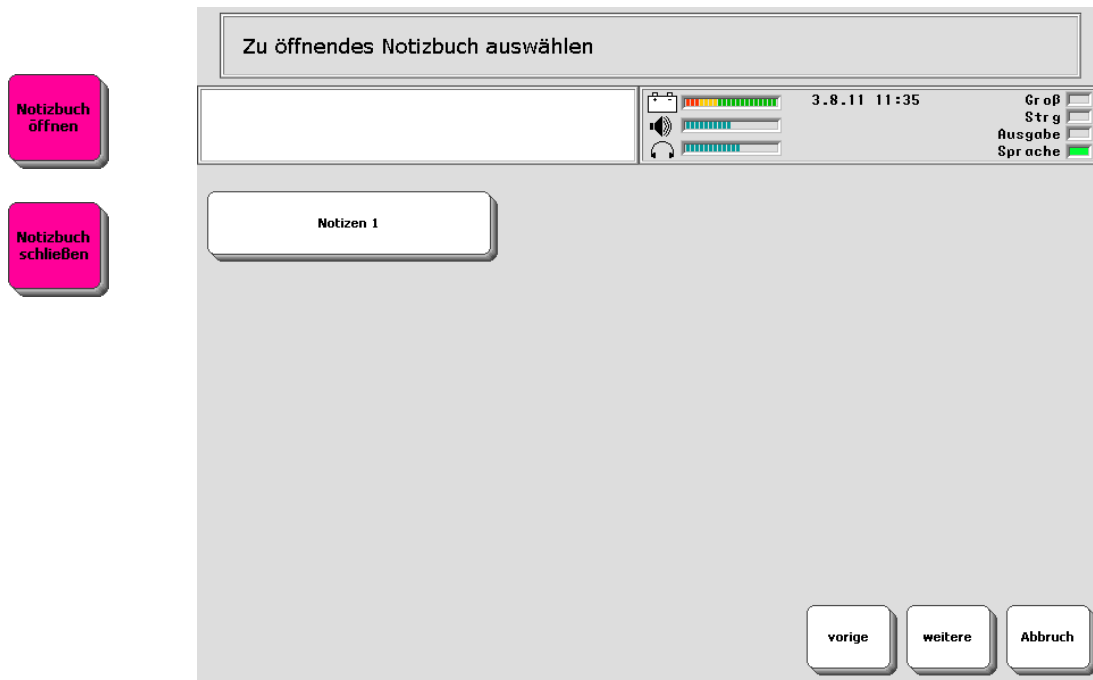

Rechner

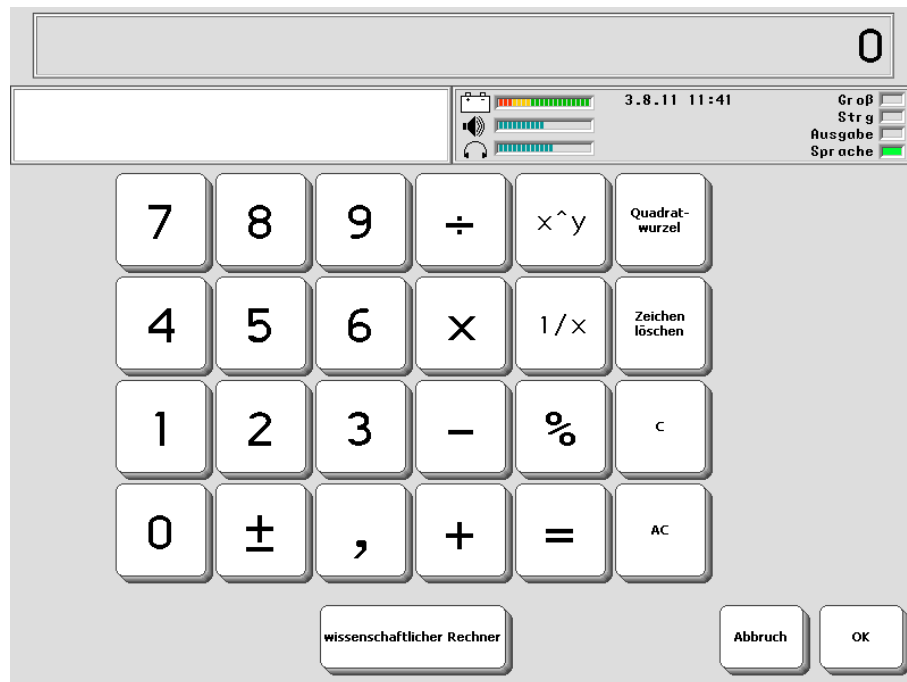


Infrarot-Signale


Der Talker verfügt über eine eingebaute lernfähige Infrarot-Umfeldkontrolle. Das bedeutet, dass Sie mit dem Talker Ihre IR-fernbedienbaren Geräte steuern können, wenn Sie dem Talker zuvor die entsprechenden IR-Befehle beigebracht haben.

Bitte lesen Sie dazu die entsprechenden Abschnitte im Kapitel „Umfeldkontrolle“ in der Bedienungsanleitung.


Im Programm „ABC 60“ haben wir bereits Seiten angelegt, auf denen Sie die IR-Befehle für TV, Video, CD, Radio und Kassette speichern können. Die Seiten zu den verschiedenen Geräten öffnen Sie von der INFRAROT-SEITE ausgehend.

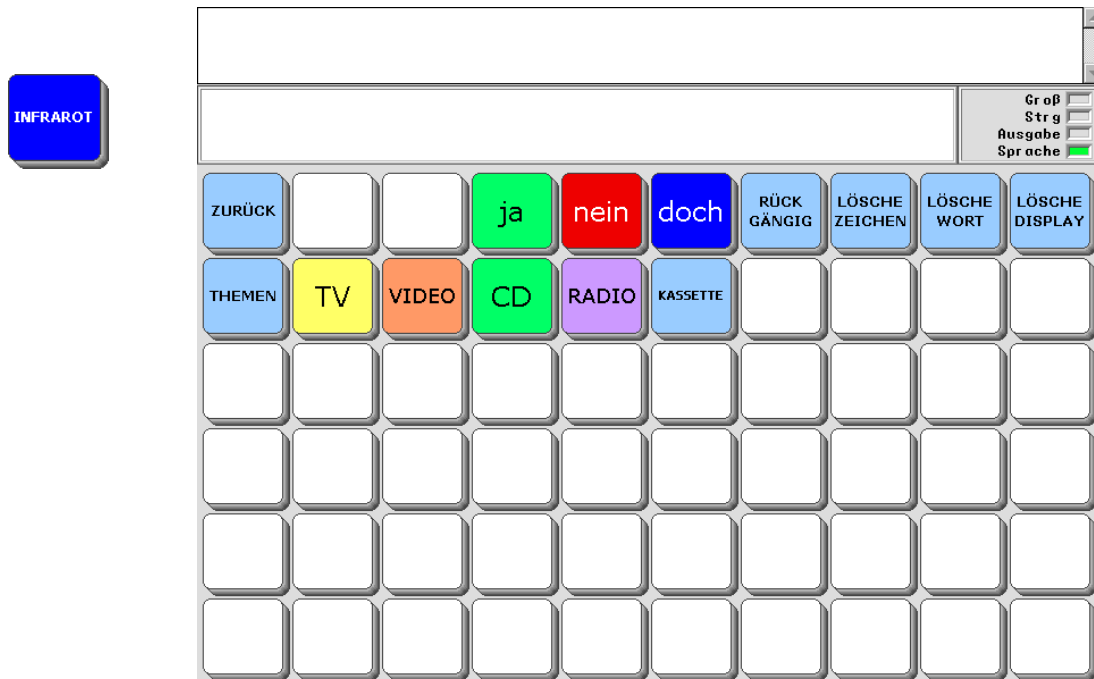


Die Seite IR TV zum Steuern des Fernsehers

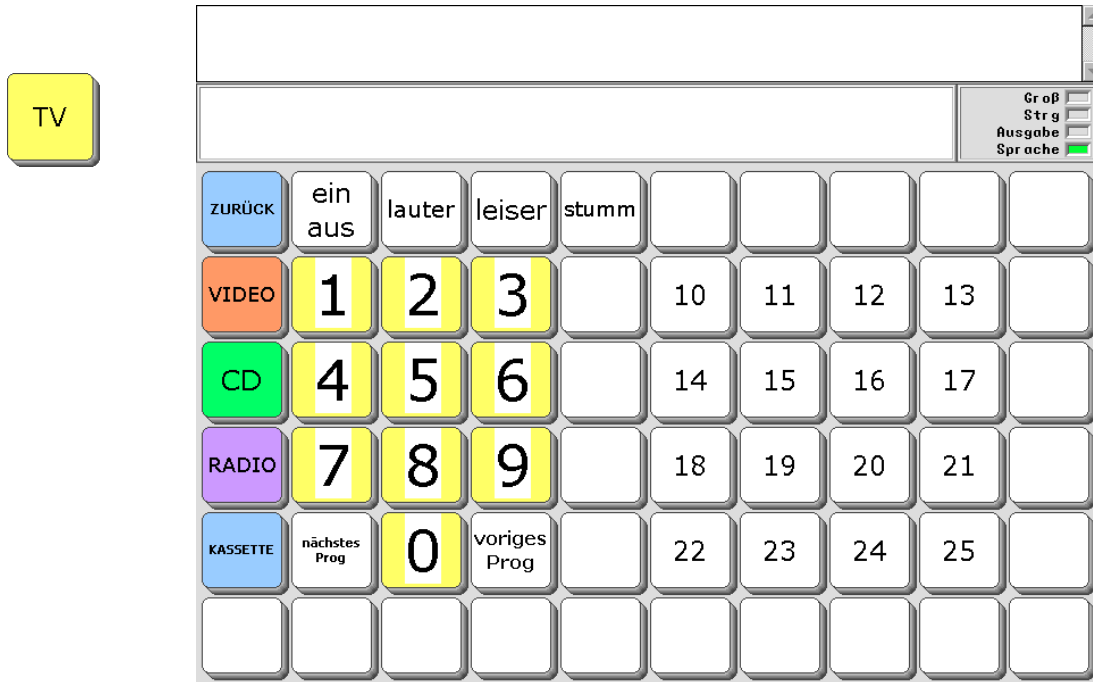


Die Seite IR VIDEO zum Steuern des Videorekorders

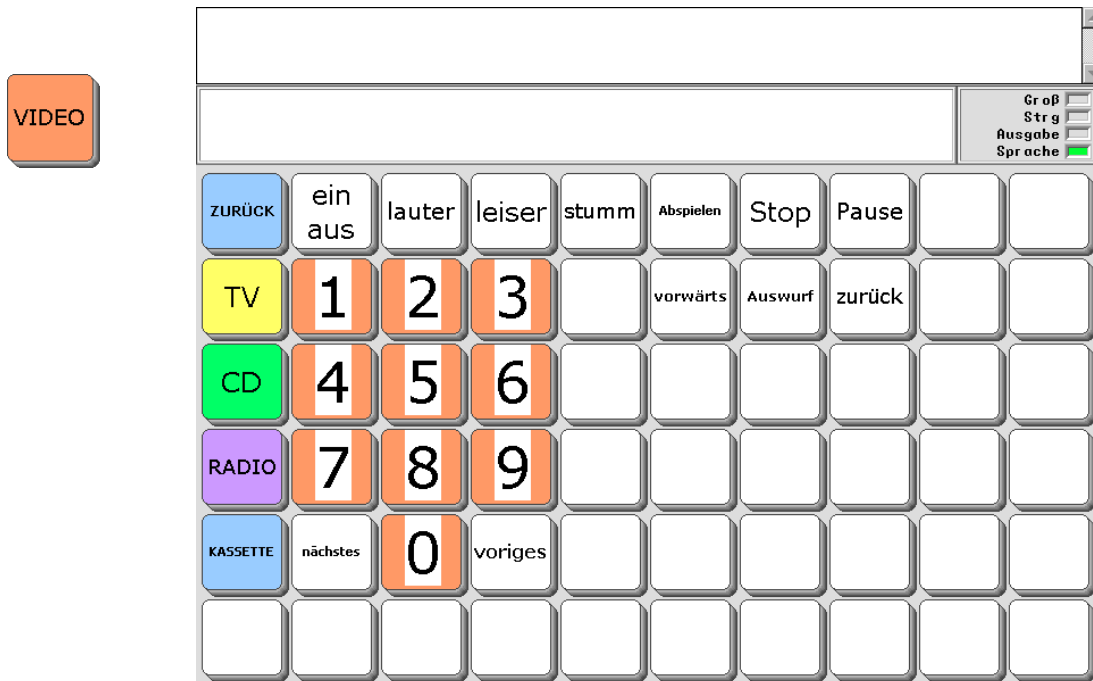

Die Seite IR CD zum Steuern des CD-Spielers

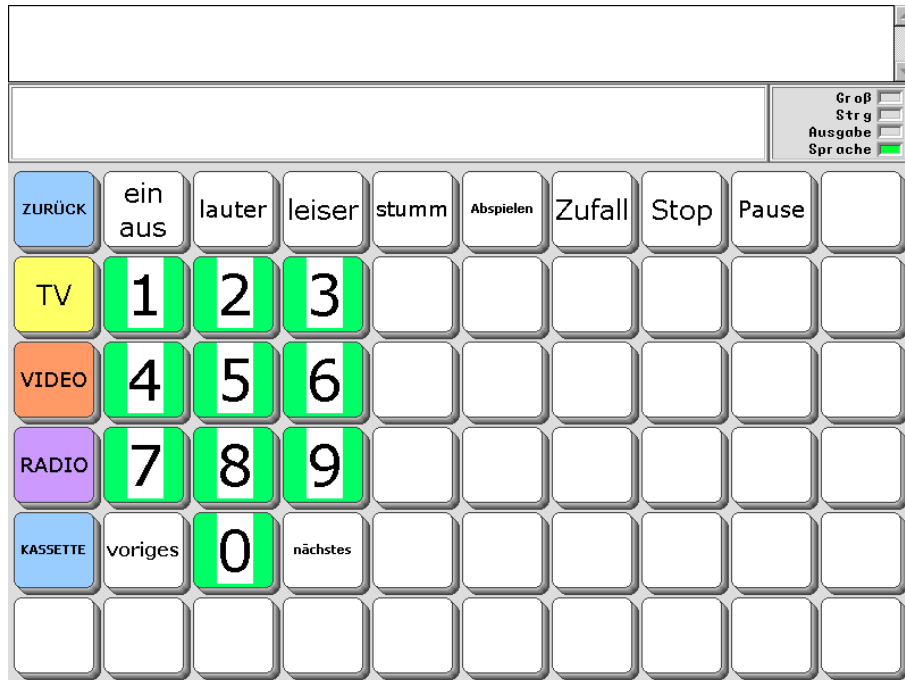

Die Seite IR RADIO zum Steuern der Stereoanlage

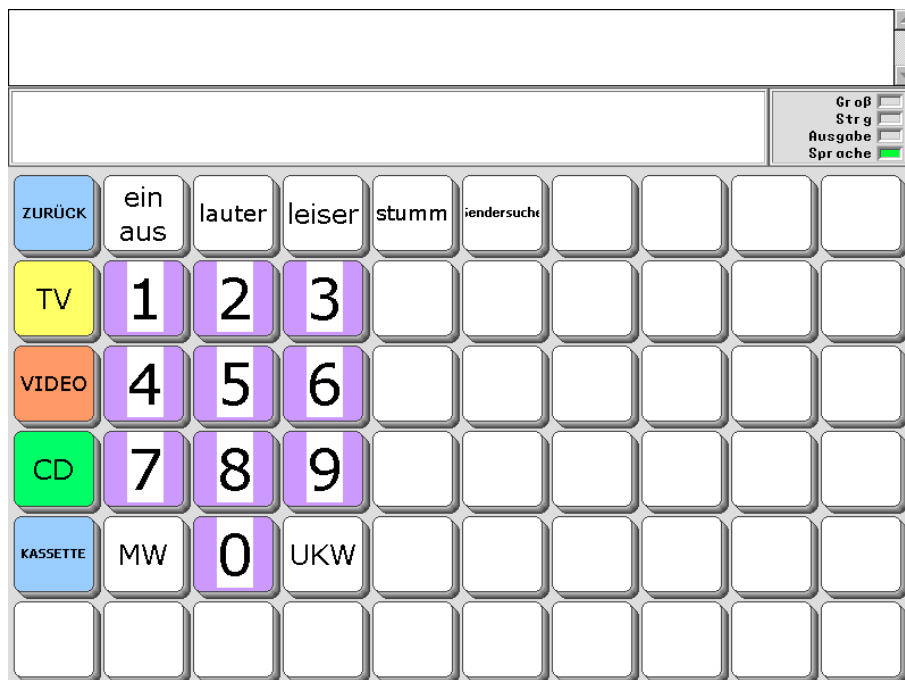


Die Seite IR KASSETTE zum Steuern des Kassettenrekorders



								Groß Strg Ausgabe Sprache	
ZURÜCK	ein aus	lauter	leiser	stumm	Abspielen	Stop	Pause		
TV					vorwärts	Auswurf	zurück		
VIDEO									
CD									
RADIO									

MP3-Dateien abspielen

Der Talker kann Musik-Dateien im Format MP3, WMA und WAV wiedergeben. Sie können einzelne Dateien entweder direkt auf der MP3-Seite speichern oder sie mit Hilfe des Menüs MP3-PLAYER von einem USB-Stick oder einer SD-Karte lesen lassen.

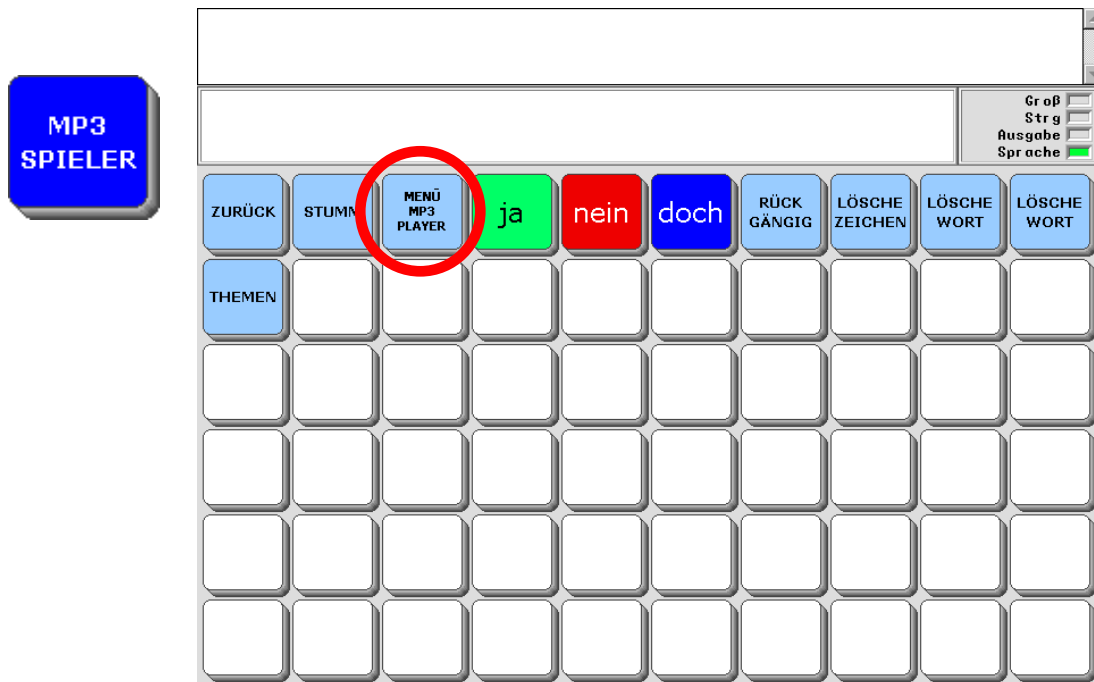

Um eine Musik-Datei direkt auf der MP3-SEITE zu speichern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. USB-Stick anschließen oder SD-Karte mit der oder den zu speichernden Datei(en) einlegen
2. Toolbox öffnen
3. SEITE ÄNDERN: Seite „MP3“ auswählen
4. Taste auswählen, auf der die Datei gespeichert werden soll
5. NAME ÄNDERN: z.B. Titel eingeben
6. ART DER MITTEILUNG: digital
7. SOUNDDATEI IMPORTIEREN: Datei auswählen
8. OK
9. START


Da Musik-Dateien viel Speicherplatz benötigen, empfehlen wir Ihnen, nur eine begrenzte Zahl von Liedern direkt auf der MP3-SEITE zu speichern und ansonsten das Menü MP3-PLAYER zur Wiedergabe von Sounddateien zu benutzen, die von einem externen Datenträger (USB-Stick, SD-Karte) wiedergegeben werden.

Lesen Sie dazu bitte das Kapitel „MP3-Player“ in der Bedienungsanleitung.


Computer steuern

Der Talker kann als Tastatur und Mauseinsatz zur Computeransteuerung benutzt werden. Wir haben für Sie bereits 3 Seiten zur PC-Steuerung vorbereitet, die zwar im Seitenarchiv Ihres Talkers hinterlegt, aber standardmäßig **nicht** mit der Benutzerebene verknüpft sind.

im Lieferzustand noch keine Verknüpfung!

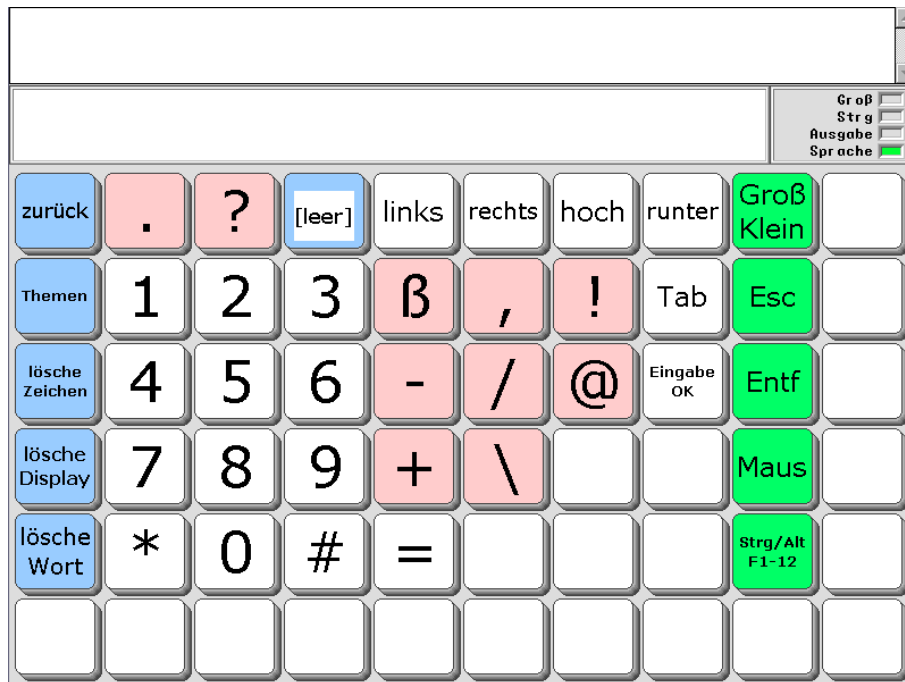

Strg/Alt F1-12

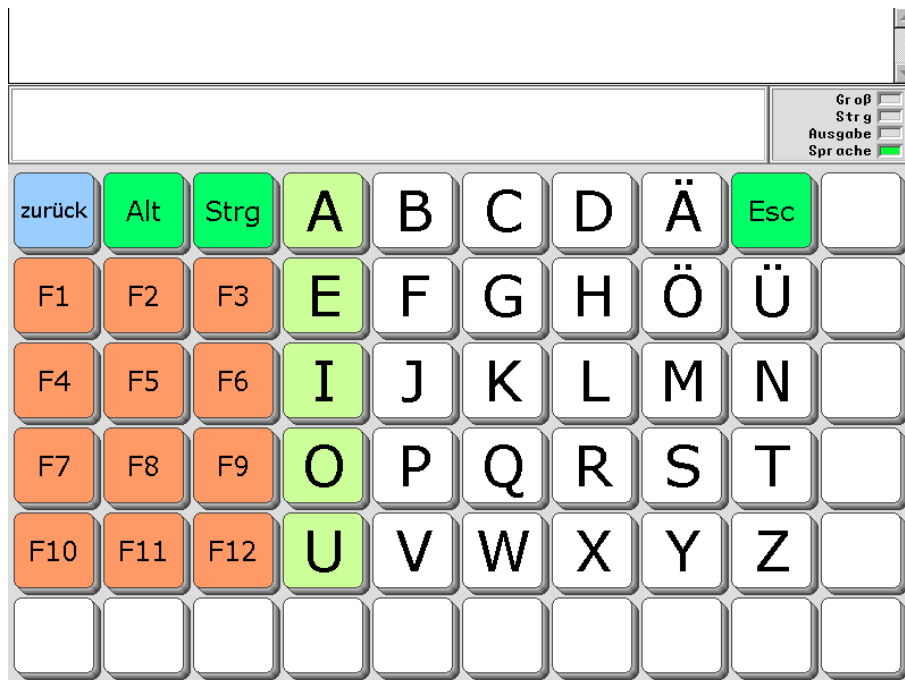

Maus

Taste auswählen

8.3.11 2:30PM

Größ
Strg
Ausgabe
Sprache


zurück	■	Links klick	viel nach links oben	viel nach oben links	viel nach oben	viel nach oben rechts	viel nach rechts oben	Maus reset	
Maus oben links	Maus oben mitte	Maus oben rechts		etwas nach links oben	etwas nach oben	etwas nach rechts oben		Esc	
Maus mitte links	Maus mitte mitte	Maus mitte rechts		etwas nach links	Doppel klick	etwas nach rechts			
Maus unten links	Maus unten mitte	Maus unten rechts		etwas nach links unten	etwas nach unten	etwas nach rechts unten			
Rechts klick	linke Taste halten	linke Taste loslassen							

Seiten zur Computersteuerung verknüpfen


Wenn Sie die PC-Seiten nutzen möchten, brauchen Sie nur eine Verknüpfung zu ändern. Die Änderung betrifft auf der SCHRIFT-SEITE die Taste mit dem Punkt.

Um die Änderung vorzunehmen gehen Sie bitte wie folgt vor:


1. Toolbox öffnen
2. <SEITE ÄNDERN> : wählen Sie die SCHRIFT-SEITE
3. <Taste auswählen> : wählen Sie die Taste mit dem Punkt
4. <Text oder Befehl eingeben>

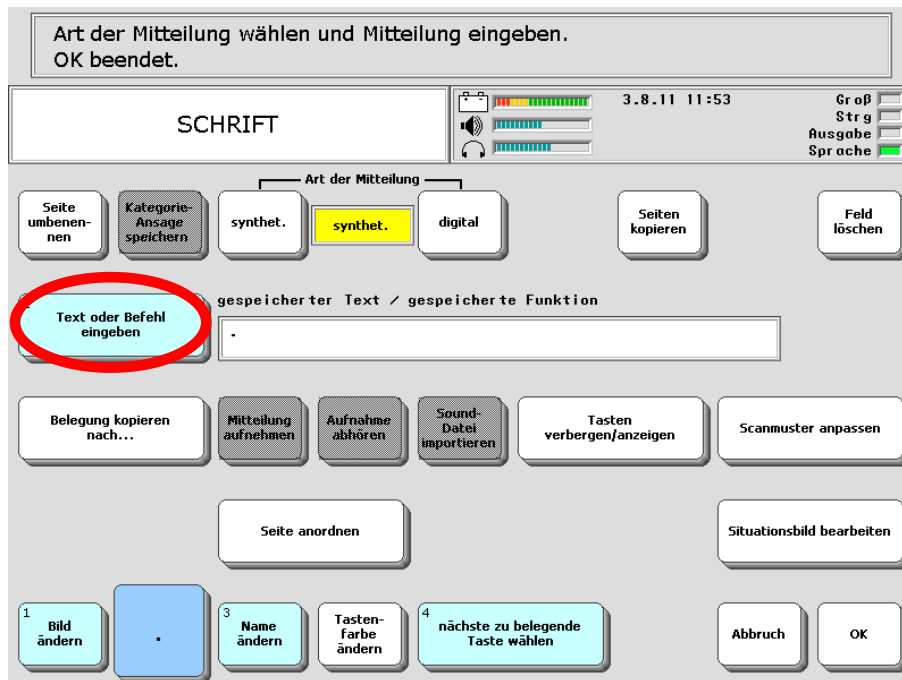


5. <lösche Display>
6. <Funktion einfügen>

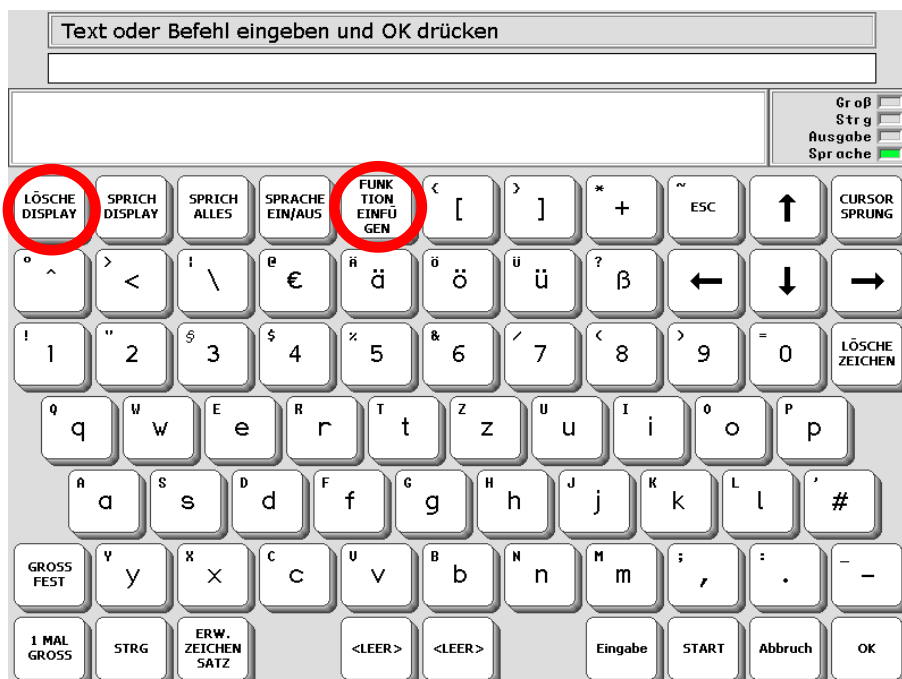


7. Tippen Sie 3x <weitere>

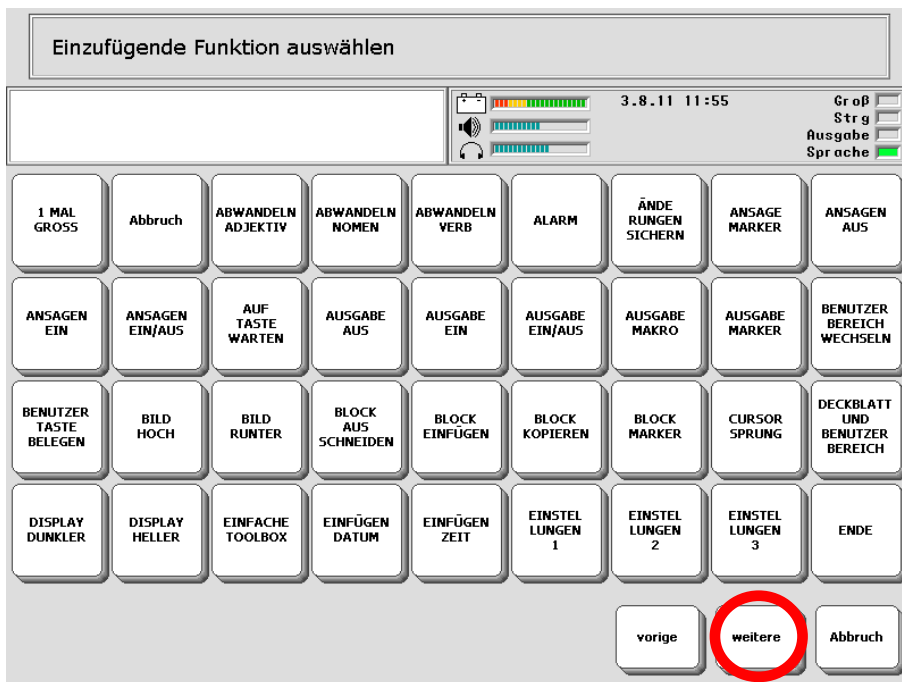


8. <Seite anzeigen>

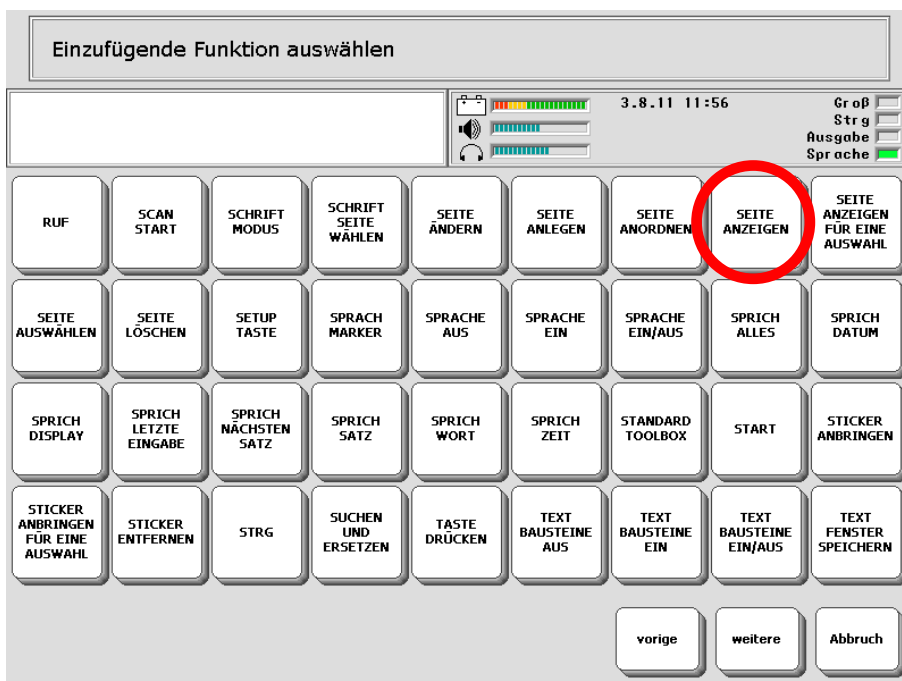


9. Wählen Sie die Seite „PC + ZEICHEN“

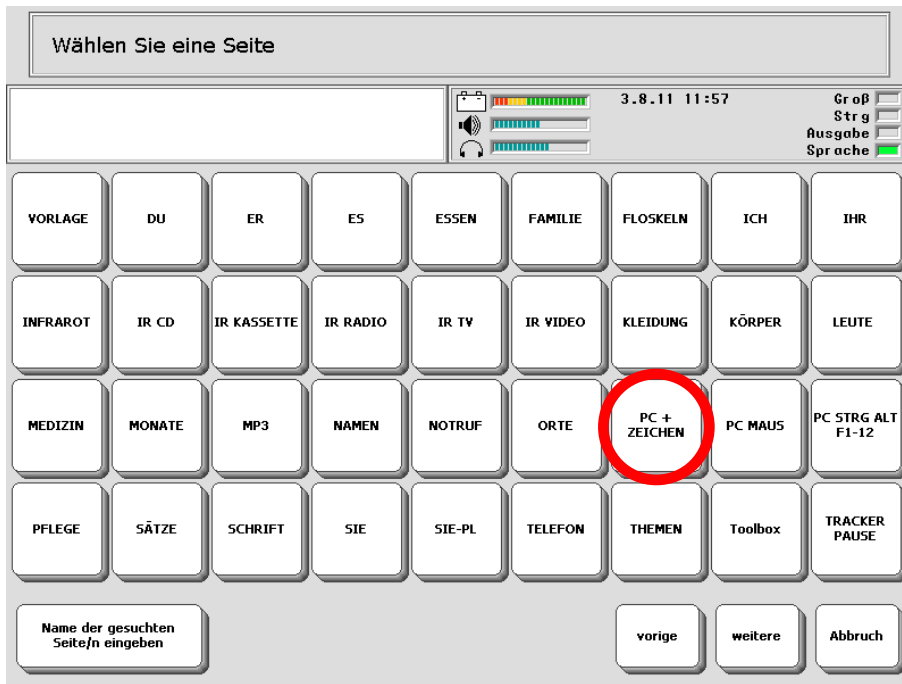


10. Verlassen Sie das Menü mit <OK>

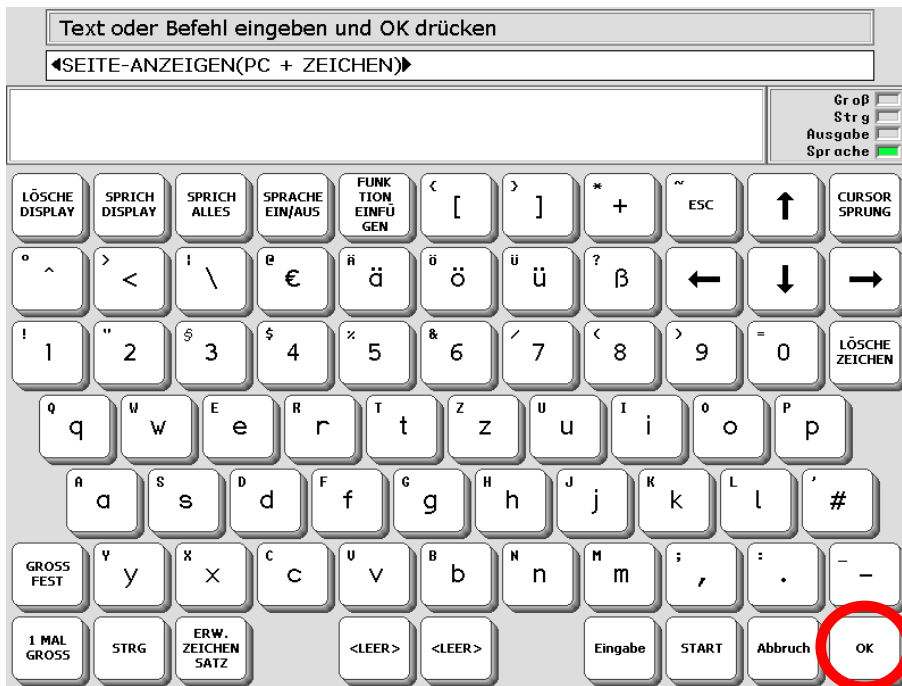

11. <Name ändern >

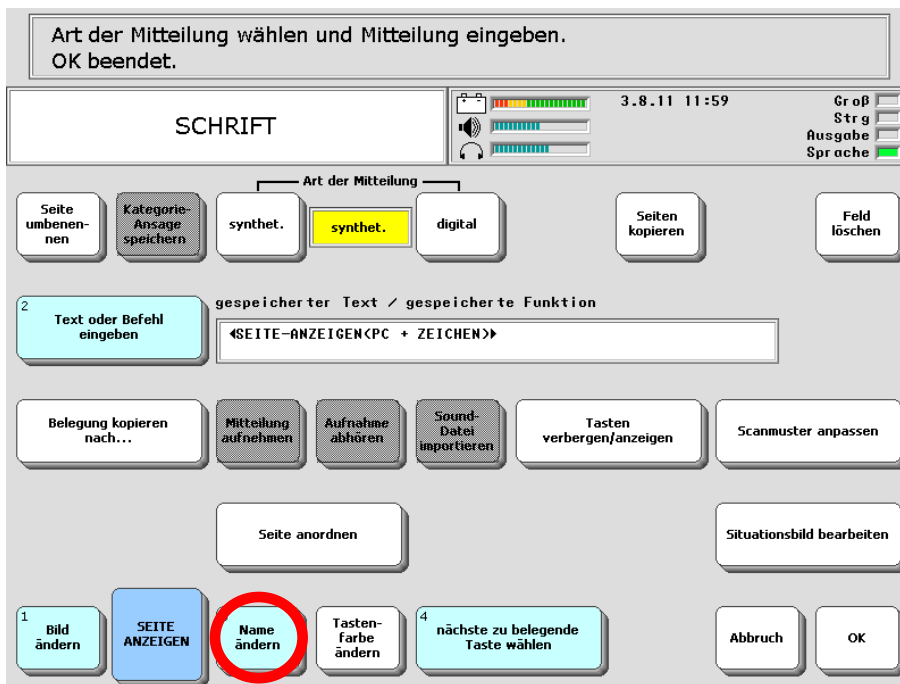

12. Schreiben Sie „PC + Zeichen“

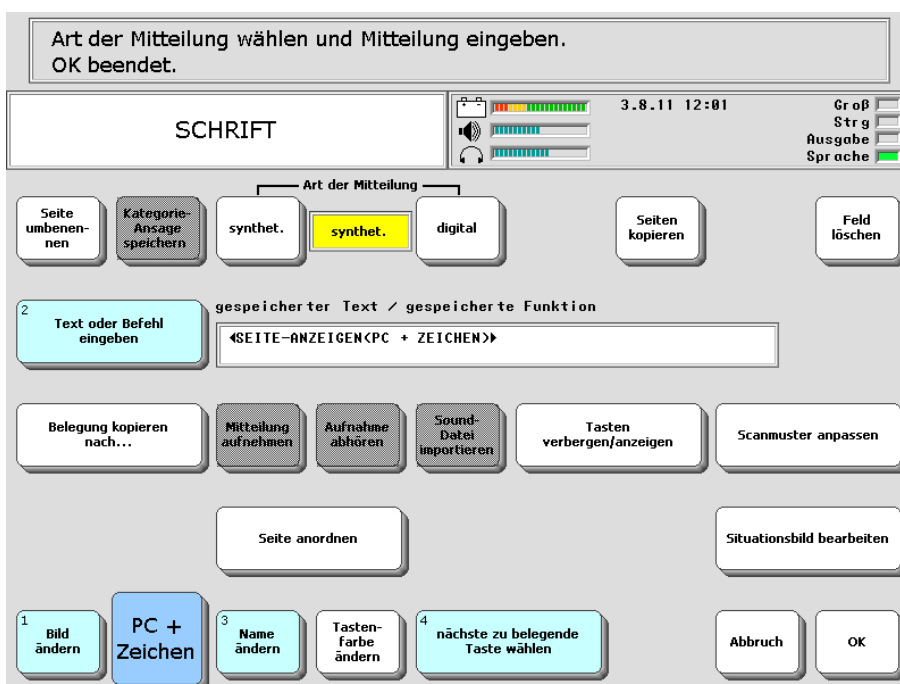


13. Verlassen Sie das Menü mit <OK>


14. Die hellblaue Taste <START> in der Toolbox bringt Sie wieder zurück zur Startseite SCHRIFT des Programms.

Ausführliche Informationen zum Thema PC-Ansteuerung mit dem Talker finden Sie in der Bedienungsanleitung im Kapitel „Computeransteuerung“.

Dort finden Sie auch Hinweise auf die jeweiligen Einstellungen für Bluetooth- oder USB-Verbindungen.

Toolbox öffnen

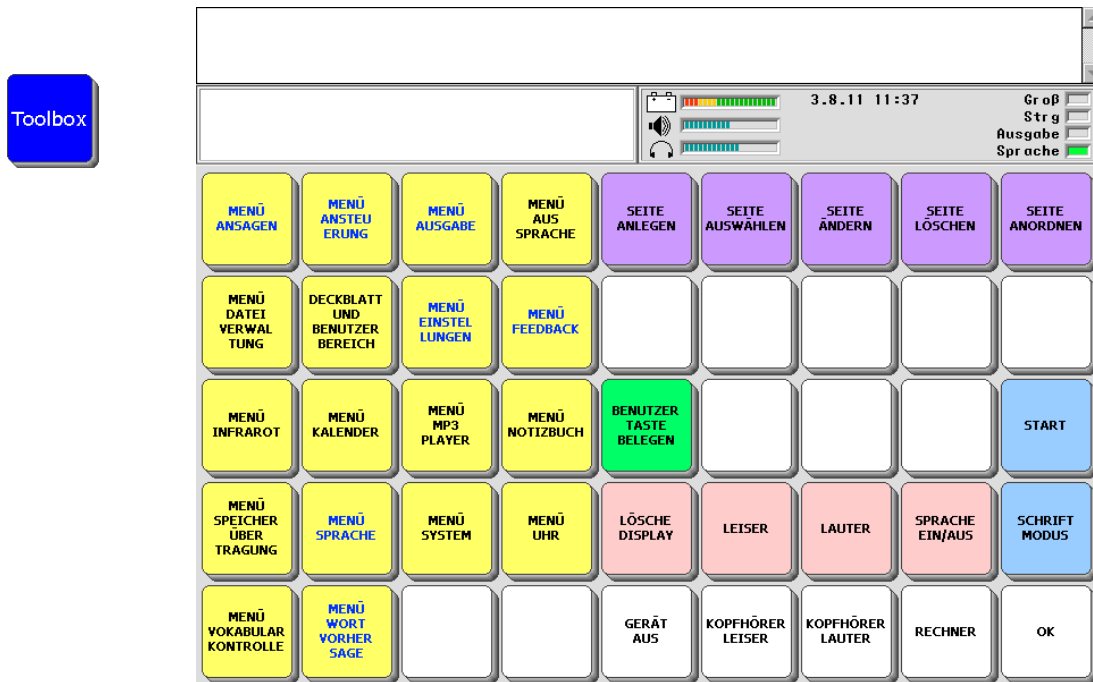


Die blaue Toolbox-Taste auf der THEMEN-SEITE erfüllt dieselbe Funktion wie die Taste  auf dem Gehäuse über dem Display.

Auf diesem Weg können auch Benutzer, die den Talker im Scanningverfahren oder mit Hilfe eines Trackers bedienen, die Toolbox erreichen.

Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Ansteuerungsoptionen finden Sie im Kapitel „Die Ansteuerungstechniken“ in der Bedienungsanleitung.

Alternative Schriftseite für Menschen mit visuellen Problemen

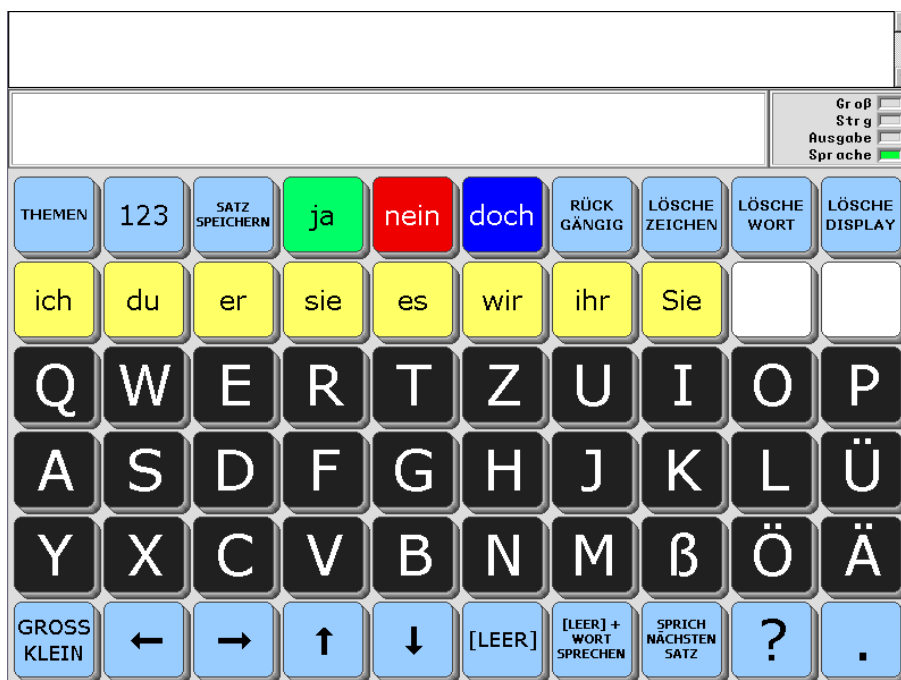


Es gibt die Startseite auch in einer kontrastreicheren Version mit weißen Buchstaben auf schwarzen Feldern. Wollen Sie diese Seite standardmäßig verwenden, so wählen Sie im Menü <DECKBLATT UND BENUTZERBEREICH> die Option <Startseite> und wählen Sie „SCHRIFT schwarz“ als Startseite aus.


Eine letzte Anregung: Speicherübertragung durchführen

Sichern Sie regelmäßig das „ABC 60“-Programm mit Ihren persönlichen Änderungen, damit Sie im Falle eines Datenverlustes (auch der Talker ist ein Computer!) eine Sicherungskopie Ihres Vokabulars in das Gerät zurück laden können.


Benutzerbereich sichern

Schließen Sie den mitgelieferten USB-Stick an den Talker an (rechte Gehäusesseite oben).

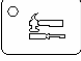
Öffnen Sie die Toolbox  und wählen Sie das <MENÜ SPEICHERÜBERTRAGUNG>

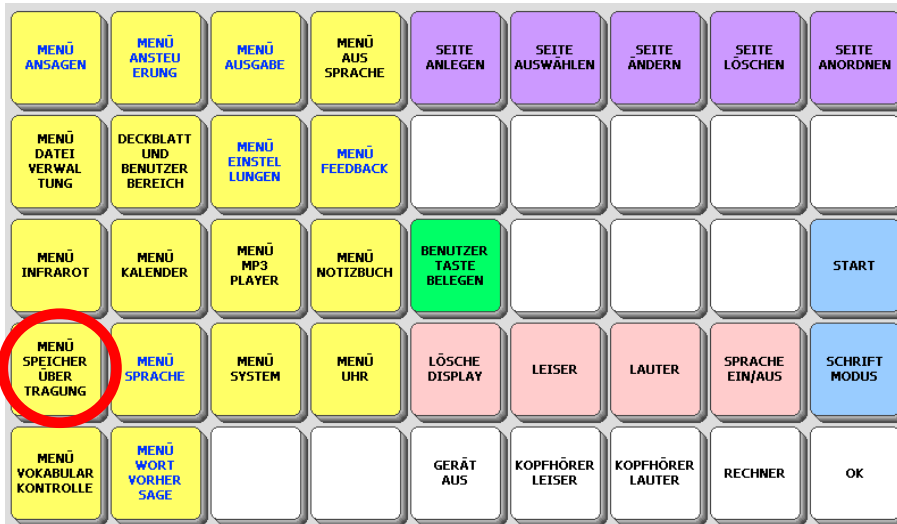

Im Feld „Übertragen von/nach“ sollte <AUTO> stehen.
Tippen Sie auf das Feld <Benutzerbereich sichern>

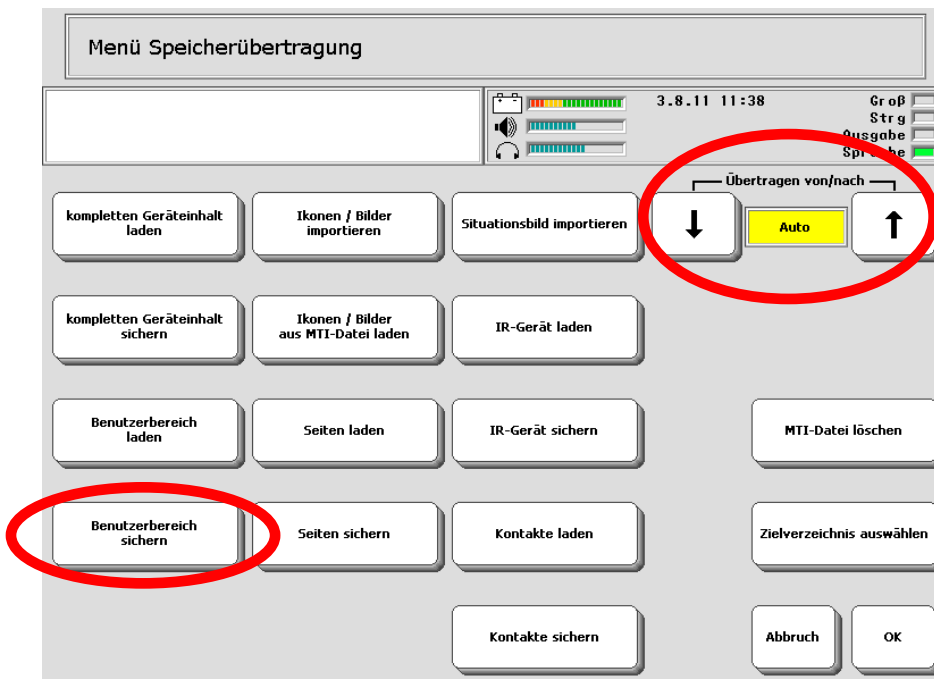


Wählen Sie <ABC 60> als zu sichernden Bereich aus.

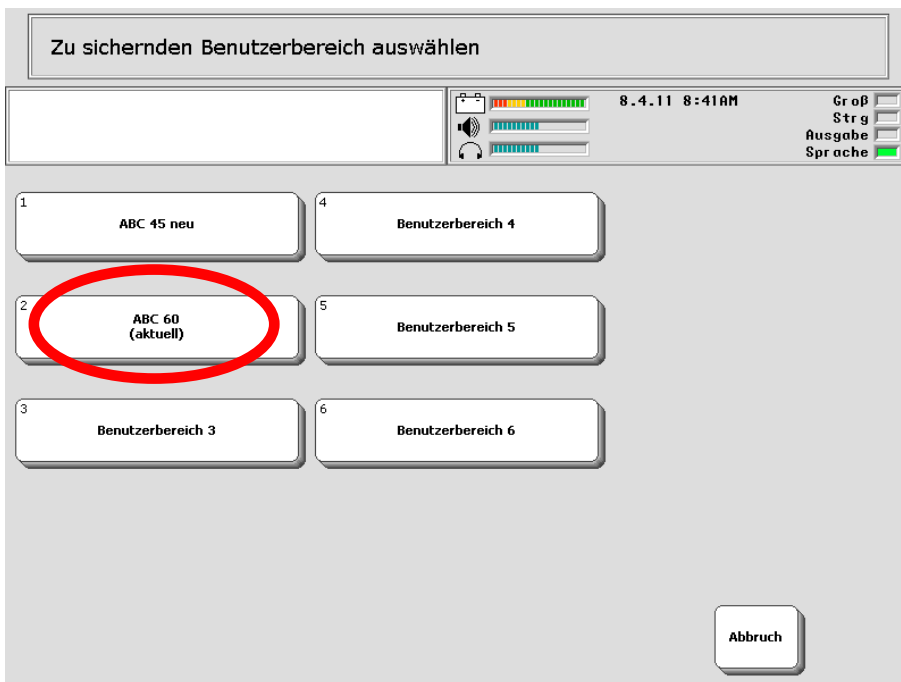

Auf der Schrifttastatur, die dann erscheint, geben Sie einen Dateinamen ein z.B. „ABC60 + Datum der Datensicherung“: „ABC60 2011-08-01“ Bestätigen Sie die Eingabe mit <OK>.

Wenn die Speicherübertragung beendet ist, erscheint eine entsprechende Meldung im Display:

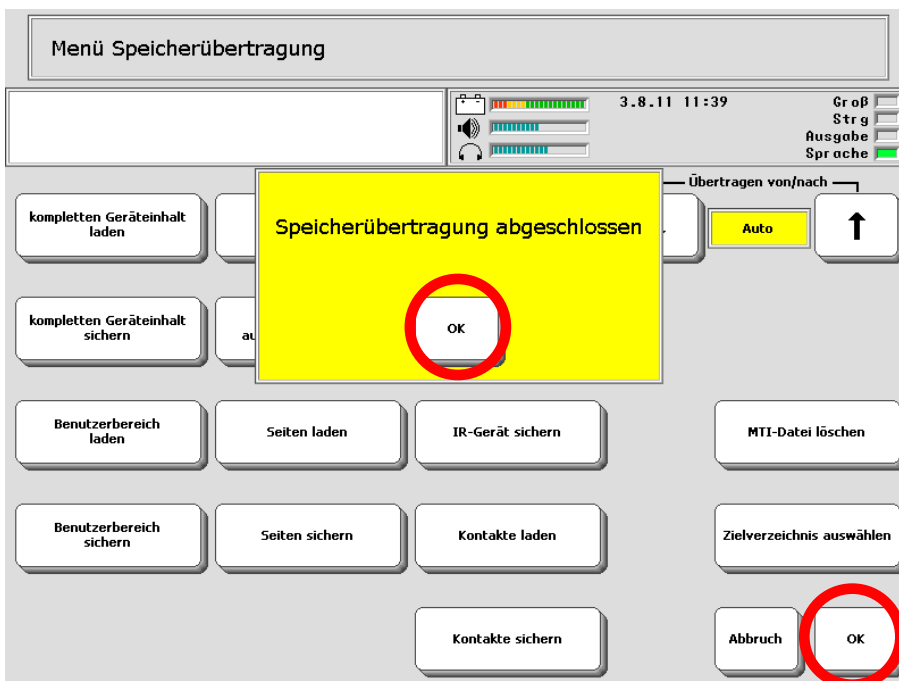


Drücken Sie <OK> im gelben Feld und danach <OK>, um das Menü zu beenden. Die hellblaue Taste <START> in der Toolbox bringt Sie wieder zurück zur Startseite SCHRIFT des Programms.

Benutzerbereich laden

Wenn Sie eine Datei vom USB-Stick zurück in den Talker laden möchten, gehen Sie wie folgt vor:

13. USB-Stick an den Talker anschließen
14. Toolbox öffnen
15. <Menü Speicherübertragung>
16. <Benutzerbereich laden>
17. Benutzerbereich auswählen, in den die Datei geladen werden soll
18. Es erscheint ein gelbes Feld mit einer Abfrage:

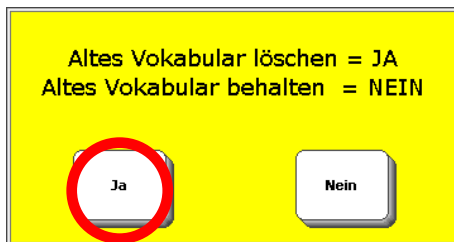

19. Wählen Sie <JA>
20. Die auf dem USB-Stick vorhandenen Dateien werden angezeigt
21. Wählen Sie die zu ladende Datei aus
22. Die Speicherübertragung wird durchgeführt
23. Drücken Sie <OK> im gelben Feld und danach <OK>, um das Menü zu beenden.
24. <START> bringt Sie zurück zum Start des Programms.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Talker!