


Big-Point

Anleitung

Der Big-Point ist eine sprechende Taste mit einer Kapazität von 30 Sekunden.

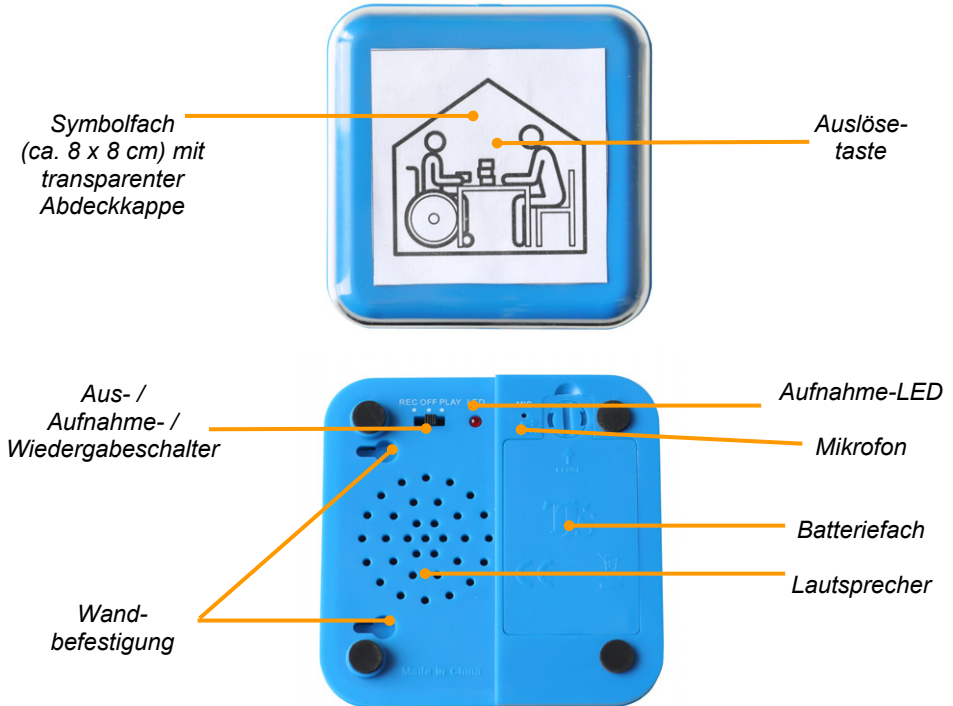

Aufnehmen einer Mitteilung

- Schieben Sie den Schiebeschalter auf der Unterseite in die Position „REC“ (Aufnahme).
- Drücken Sie die Auslösetaste und sprechen Sie in das Mikrofon. Die Aufnahme-LED leuchtet rot und zeigt an, dass die Aufnahme läuft.
- Lassen Sie die Auslösetaste los, sobald Sie die Mitteilung zu Ende gesprochen haben.
- Schieben Sie die Schiebeschalter auf der Unterseite wieder in die Position „PLAY“ (Wiedergabe).

Wiedergeben einer Mitteilung

- Drücken Sie die Auslösetaste.

Symbol einlegen

- Nehmen Sie die transparente Abdeckkappe ab.
- Legen Sie das Symbol auf die Taste.
- Befestigen Sie die transparente Abdeckkappe wieder auf der Taste.

Big-Point aus- und einschalten

- Zum Ausschalten schieben Sie den Schiebeschalter auf der Unterseite in die Position „OFF“.
- Zum Einschalten schieben Sie den Schiebeschalter auf der Unterseite in die Position „PLAY“.

Batterien wechseln

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite, indem Sie mit einer passenden Münze das Batteriefachschloss um 90° drehen.
- Legen Sie 3 Batterien vom Typ AAA (Micro) richtig gepolt ein.
- Schließen Sie das Batteriefach und verriegeln Sie es, indem Sie mit einer passenden Münze das Batteriefachschloss um 90° drehen.
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese ausschließlich über den Handel oder die speziell dafür eingerichteten Sammelstellen!

Hinweise zur Entsorgung



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte gekennzeichnet. Nutzen Sie die von Ihrer Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte.



PRD

Prentke Romich Deutschland
Kommunikation ohne Grenzen

Prentke Romich GmbH

Goethestr. 31
D - 34119 Kassel
Tel. (0561) 7 85 59-0
Fax (0561) 7 85 59-29
E-Mail info@prentke-romich.de
Web www.prentke-romich.de