


Big Button Steps & Levels

Anleitung



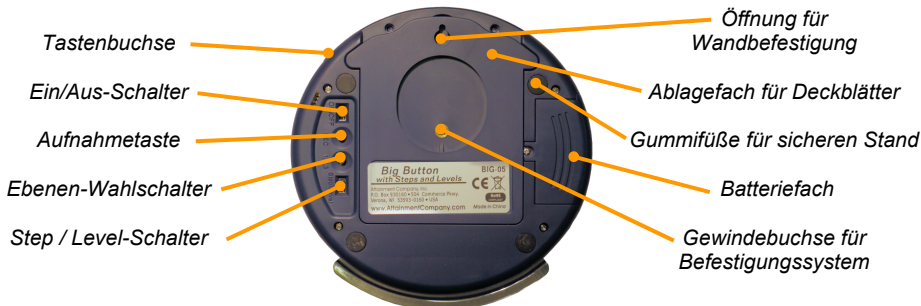

Ebenen- und Schritt-Modus

Im **Ebenen-Modus** („Levels“) verfügt der *Big Button Steps & Levels* über 10 Ebenen, die jeweils 1 Mitteilung aufnehmen können.

- Bringen Sie den Schiebeschalter „Step/Level“ in Position „Level“.
- Wählen Sie die Ebene durch wiederholtes Drücken der Taste „1,2,3“. Die Ebene wird im Display angezeigt, wobei „L“ für die letzte Ebene (Ebene 10) steht.
- Drücken Sie die Auslösetaste, um die Mitteilung wiederzugeben.

Im **Schritt-Modus** („Steps“) verfügt der *Big Button Steps & Levels* über 3 Ebenen, die jeweils bis zu 10 Mitteilungen aufnehmen können.

- Bringen Sie den Schiebeschalter „Step/Level“ in Position „Step“.
- Wählen Sie die Ebene A, B oder C durch wiederholtes Drücken der Taste „1,2,3“. Die Ebene wird im Display angezeigt.
- Drücken Sie die Auslösetaste, um die Mitteilungen der Ebene in der Reihenfolge der Aufnahme wiederzugeben. Die Nummer der jeweiligen Aussage wird im Display angezeigt.
- Nach Wiedergabe der letzten Aussage zeigt der *Big Button Steps & Levels* ein „L“ im Display.
- Drücken und Halten Sie die Auslösetaste 5 Sekunden, um mit der Wiedergabe der Aussagen der jeweiligen Ebene wieder von vorne beginnen zu können.

Aufnahme von Mitteilungen im Ebenen-Modus

1. Bringen Sie den Schiebeschalter „Step/Level“ in Position „Level“.
2. Drücken Sie einmal kurz die Aufnahme-Taste. Die Aufnahme-LED leuchtet rot.
3. Wählen Sie die Ebene durch wiederholtes Drücken der Taste . Die Ebene (1-9 und L = letzte) wird im Display angezeigt.
4. Drücken Sie einmal kurz die Auslösetaste. Die rote Aufnahme-LED beginnt zu blinken, die Aufnahme läuft. Sprechen Sie die Mitteilung aus einem Abstand von ca. 20 cm in das Mikrofon.

5. Drücken Sie die Auslösetaste erneut, um die Aufnahme zu beenden.
6. Drücken Sie die Taste , um Ihre Aufnahme zu kontrollieren. Wiederholen Sie Schritt 4.-5., wenn Ihnen die Aufnahme nicht gefällt.
7. Beenden Sie den Aufnahmemodus durch erneutes Drücken der Aufnahme-Taste.

Sie können jede Mitteilung in jeder Ebene individuell löschen und neu aufnehmen.

Aufnahme von Mitteilungen im Schritt-Modus

1. Bringen Sie den Schiebeschalter „Step/Level“ in Position „Step“.
2. Wählen Sie Ebene A, B oder C durch wiederholtes Drücken der Taste „1,2,3“. Die Ebene wird im Display angezeigt. Pro Ebene können Sie bis zu 10 Mitteilungen speichern.
3. Drücken Sie einmal kurz die Aufnahme-Taste. Die Aufnahme-LED leuchtet rot und im Display erscheint die „1“.
4. Drücken Sie einmal kurz die Auslösetaste. Die rote Aufnahme-LED beginnt zu blinken, die Aufnahme läuft. Sprechen Sie die Mitteilung aus einem Abstand von ca. 20 cm in das Mikrofon.
5. Drücken Sie die Auslösetaste erneut, um die Aufnahme zu beenden. Die LED auf der Oberseite des *Big Buttons Steps & Levels* hört auf zu blinken und im Display erscheint die „2“.
6. Drücken Sie die Taste , um Ihre Aufnahme zu kontrollieren. Drücken Sie die Taste , wählen Sie die gewünschte Aussage und wiederholen Sie Schritt 4.-5., wenn Ihnen eine Aufnahme nicht gefällt.
7. Wiederholen Sie Schritt 4.-5, um weitere Mitteilungen (insg. bis zu 10) aufzunehmen.
8. Beenden Sie den Aufnahmemodus durch erneutes Drücken der Aufnahme-Taste.

Sie können jede Mitteilung in jeder Ebene individuell löschen und neu aufnehmen.

Löschen einer Ebene

1. Drücken Sie einmal kurz die Aufnahme-Taste. Die Aufnahme-LED leuchtet rot.
2. Wählen Sie die zu löschende Ebene durch wiederholtes Drücken der Taste .
3. Drücken Sie **zweimal** kurz die Auslösetaste, um die Ebene zu löschen.
4. Beenden Sie den Aufnahmemodus durch erneutes Drücken der Aufnahme-Taste.

Löschen einer einzelnen Mitteilung im Schritt-Modus

1. Wählen Sie Ebene A, B oder C durch Drücken der Taste „1,2,3“.
2. Drücken Sie einmal kurz die Aufnahme-Taste. Die Aufnahme-LED leuchtet rot.
3. Wählen Sie die zu löschende Aussage durch wiederholtes Drücken Sie die Taste .
4. Drücken Sie **zweimal** kurz die Auslösetaste, um die Aussage zu löschen.
5. Beenden Sie den Aufnahmemodus durch erneutes Drücken der Aufnahme-Taste.

Löschen aller Mitteilungen einer Ebene im Schritt-Modus

1. Drücken Sie einmal kurz die Aufnahme-Taste. Die Aufnahme-LED leuchtet rot.
2. Wählen Sie Ebene A, B oder C durch wiederholtes Drücken der Taste „1,2,3“.
3. Drücken und Halten sie die Aufnahme-Taste bis zum Piepton (ca. 5 Sekunden).
4. Beenden Sie den Aufnahmemodus durch erneutes Drücken der Aufnahme-Taste.

Ebenensperre

Um das unbeabsichtigte Wechseln von Ebenen zu verhindern:

- Schalten Sie den *Big Button Steps & Levels* aus.
- Drücken und Halten Sie die Taste , während Sie den *Big Button Steps & Levels* wieder einschalten.
- Lassen Sie die Taste  los, sobald der *Big Button Steps & Levels* zwei aufsteigende Pieptöne ausgegeben hat. Die Ebenensperre ist nun aktiviert.

Um die Ebenensperre wieder zu deaktivieren, gehen Sie genauso vor. Der *Big Button Steps & Levels* gibt zwei absteigende Pieptöne aus und zeigt damit an, dass die Ebenensperre deaktiviert wurde.

Zur Unterbringung nicht benötigter Deckblätter dient die **Deckblattaufbewahrung** auf der Unterseite des *Big Buttons Steps & Levels*.



Batteriewechsel

Zum Wechsel der Batterien öffnen Sie die Schraube des Batteriefachdeckels. Setzen Sie 2 frische Batterien vom Typ AAA richtig gepolt ein. Verschließen Sie das Batteriefach wieder. **Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese ausschließlich über den Handel oder die speziell dafür eingerichteten Sammelstellen!**



Hinweise zur Entsorgung

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte gekennzeichnet. Nutzen Sie die von Ihrer Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte.

Aufnahmesperre

Um das unbeabsichtigte Löschen oder Neuaufnehmen von Mitteilungen zu verhindern:

- Schalten Sie den *Big Button Steps & Levels* aus.
- Drücken und Halten Sie die Taste , während Sie den *Big Button Steps & Levels* wieder einschalten.
- Lassen Sie die Taste  los, sobald der *Big Button Steps & Levels* zwei aufsteigende Pieptöne ausgegeben hat. Die Aufnahmesperre ist nun aktiviert.

Um die Aufnahmesperre wieder zu deaktivieren, gehen Sie genauso vor. Der *Big Button Steps & Levels* gibt zwei absteigende Pieptöne aus und zeigt damit an, dass die Aufnahmesperre deaktiviert wurde.

Prentke Romich GmbH

Goethestr. 31
D - 34119 Kassel
Tel. (0561) 7 85 59-0
Fax (0561) 7 85 59-29
E-Mail info@prentke-romich.de
Web www.prentke-romich.de



PRD

Prentke Romich Deutschland
Kommunikation ohne Grenzen