


# ExpressOne

## Anleitung


Der ExpressOne ist eine sprechende Taste mit einer Kapazität von 10 Sekunden.

Öffnung für  
Deckblätter  
(7,6 x 12,7 cm  
10,2 x 15,2 cm  
12,7 x 17,8 cm)

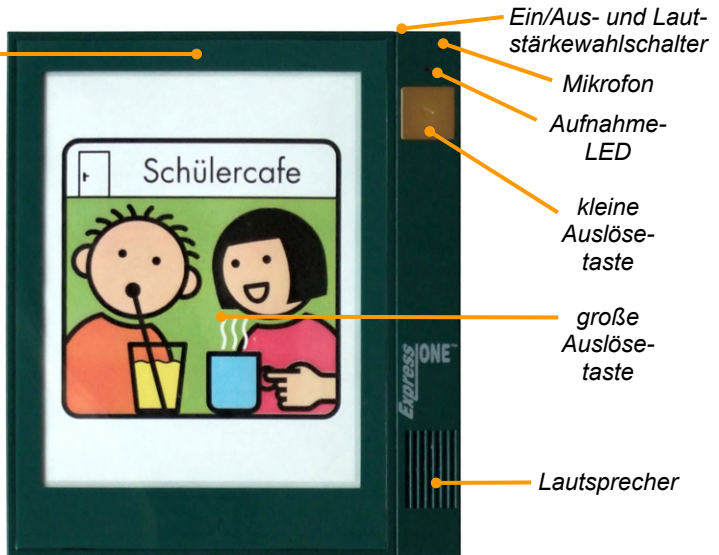

### ExpressOne ein- und ausschalten

- Zum Einschalten schieben Sie den Schiebeschalter auf der oberen Schmalseite in die Position „Hi“ (Wiedergabe mit hoher Lautstärke) oder „Lo“ (Wiedergabe mit geringer Lautstärke).
- Zum Ausschalten schieben Sie den Schiebeschalter auf der oberen Schmalseite in die Position „Off“.

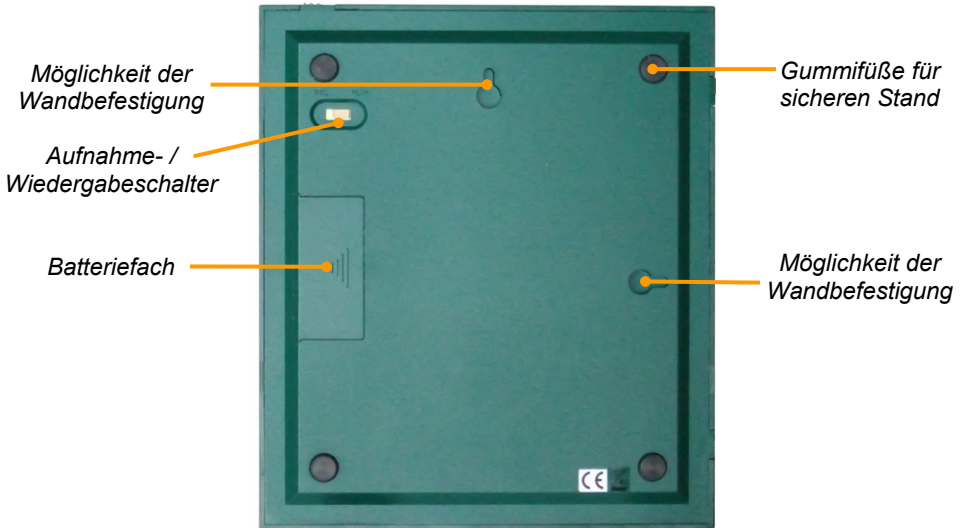

## **Aufnahmen einer Mitteilung**

- Schieben Sie die Schiebeschalter auf der Unterseite in die Position „REC“ (Aufnahme).
- Drücken Sie die große Auslösetaste (das Foto/Bild/Symbol) und sprechen Sie in das Mikrofon. Die Aufnahme-LED leuchtet rot und zeigt an, dass die Aufnahme läuft. Hinweis: die kleine goldene Wiedergabetaste kann nicht zum Aufnehmen verwendet werden.
- Lassen sie die Auslösetaste los, sobald Sie die Mitteilung zu Ende gesprochen haben
- Schieben Sie die Schiebeschalter auf der Unterseite in die Position „PLAY“ (Wiedergabe).

## **Wiedergeben einer Mitteilung**

- Drücken Sie die große Auslösetaste (das Foto/Bild/Symbol) oder die kleine goldene Auslösetaste.


## **Lautstärke einstellen**

- Für die höhere Lautstärke schieben Sie den Schiebeschalter auf der oberen Schmalseite in die Position „Hi“.

- Für die niedrigere Lautstärke schieben Sie den Schiebeschalter auf der oberen Schmalseite in die Position „Lo“

## Bild einlegen

- Schieben Sie die beiden seitlichen Riegel nach innen und heben Sie den Rahmen an.

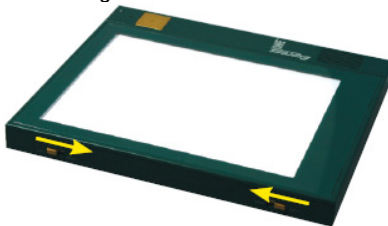

- Legen Sie das Foto / Bild / Symbol ein.
- Entfernen Sie nicht benötigte Passepartouts.
- Schließen Sie den Rahmen und verriegeln Sie ihn durch Schieben der beiden Riegel nach außen.

## Batterien wechseln

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite und legen Sie 2 Batterien vom Typ AAA (Micro) richtig gepolt ein.
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese ausschließlich über den Handel oder die speziell dafür eingerichteten Sammelstellen!

## Hinweise zur Entsorgung



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte gekennzeichnet. Nutzen Sie die von Ihrer Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte.



# PRD

Prentke Romich Deutschland  
*Kommunikation ohne Grenzen*

## Prentke Romich GmbH

Goethestr. 31  
D - 34119 Kassel  
Tel. (05 61) 7 85 59-0  
Fax (05 61) 7 85 59-29  
E-Mail [info@prentke-romich.de](mailto:info@prentke-romich.de)  
Web [www.prentke-romich.de](http://www.prentke-romich.de)