

Piggy mit BIGred-Taste



Batteriebetriebene Spielzeuge

Spielzeug adaptieren

Kommunikationsanbahnung im Kindesalter

Warum Spielzeug adaptieren?

In der frühen Kommunikationsförderung von körperbehinderten und mehrfachbehinderten Kindern spielt das Adaptieren von handelsüblichen batteriebetriebenen Spielzeugen eine bedeutende Rolle. Spielzeug wird so adaptiert, dass es mit einer einfachen externen Taste benutzt werden kann. Kinder mit schweren körperlichen oder geistigen Einschränkungen bekommen dadurch die Gelegenheit, beim Spiel mit anderen Menschen eine aktive(re) Rolle zu übernehmen. Sie lernen, dass sie selbst einen Spielverlauf bestimmen und gestalten können. Dies ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklungs- und Kommunikationsförderung. Nicht zuletzt ist es aber auch eine gute Möglichkeit für die Kinder und ihre Spielpartner, eine Menge Spaß miteinander zu haben!

Welches Spielzeug ist geeignet?

Alle batteriebetriebenen Spielzeuge, die sich per Schalter ein- und ausschalten lassen, sind grundsätzlich adaptierbar.

Wie Sie in der Ideensammlung auf der folgenden Seite sehen können, kommt es wesentlich auf die Spielideen an.

Mit diesen Informationen möchten wir einen kleinen Einblick in die Möglichkeiten geben und Sie zum Ausprobieren anregen.

Wo kann ich Spielzeug finden?

Batteriebetriebene Spielsachen lassen sich in den unterschiedlichsten Geschäften finden. Die hier aufgeführten Beispiele wurden in größeren Spielwarengeschäften, Bürofachhandlungen und Restpostenläden entdeckt.

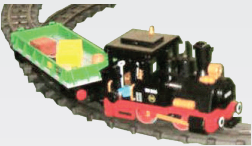
Alle abgebildeten Spielsachen lassen sich mittels Batterieunterbrecher, mit und ohne Zeitschaltuhr SLAT (Switch Latch & Timer) und mit einer geeigneten Taste (z. B. Lib Switch, JellyBean, Specs, BIGred, JellyBeamer) adaptieren. Batterieunterbrecher, Tasten und Switch Latch & Timer sind bei Prentke Romich Deutschland erhältlich. Selbstverständlich können auch andere Tasten als die aufgeführten benutzt werden.

Hoppel mit BIGred und SLAT (Switch Latch & Timer)

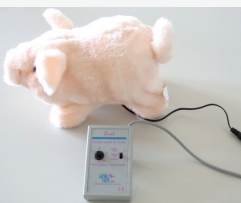


prentke romich deutschland
weil jede:r was zu sagen hat!

Spielzeug adaptieren

Spielzeug/Gerät	Beschreibung	Mögliche Aktivitäten
	Elektrische Playmobil Eisenbahn Die Funkfernbedienung lässt sich leicht mit Batterieunterbrecher und SLAT adaptieren. TIPP: mit einer zweiten Fernbedienung (von Playmobil erhältlich) und einer zweiten Taste kann das Kind vorwärts und rückwärts fahren!	Anfänger: Mit der Lok eine Kugel die Schienen entlang schieben. Fortgeschrittene: Das Kind fährt den Zug zu einem bestimmten Bahnhof und lässt Puppen ein- und aussteigen.
	Tiere Sammeln Sie Tiere für einen Bauernhof! Spielen Sie Zoo!	Anfänger: Mit SLAT und Taste adaptiert, läuft das Tier weiter, solange die Taste gedrückt wird. Fortgeschrittene: Ein Schwein bekommt ein Gummiband um den Bauch gebunden und soll damit z.B. ein Bonbon zu einem Mitspieler transportieren.
	Ventilator Fast alle batteriebetriebenen Ventilatoren lassen sich mit SLAT und Batterieunterbrecher in Sekunden adaptieren.	Anfänger: Der Ventilator wird so positioniert, dass er den Tastenpiloten anpustet. Fortgeschrittene: Mit dem Ventilator Watteklugeln über den Tisch pusten.
	Kassettenrekorder Der Kassettenrekorder muss natürlich batteriebetrieben sein!	Anfänger: Ist am SLAT die Option EIN/AUS eingestellt, kann das Kind seine Musik alleine ein- und ausschalten. Fortgeschrittene: In der Turnhalle gibt das Kind den Ton an. Alle müssen tanzen, solange die Musik läuft.
	All-Turn-It-Spinner Dieser Würfel kann sofort loslegen! Taste einstecken oder die eingebaute Taste drücken, und ab geht's. Gibt's bei PRD.	Anfänger: Das Kind übernimmt für alle Mitspieler das Würfeln bei einem Spiel. Fortgeschrittene: Wenn die Würfelbilder im äußeren Ring durch Fotos der Mitspieler ersetzt werden, kann das Kind bestimmen, wer als nächstes wie viele Felder gehen darf.
	Massagetier Es gibt eine Vielzahl batteriebetriebener Massagetiere, z.B. Käfer, Biene oder Frosch.	Anfänger: Ein Massagetier macht konkret den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung erfahrbar. Unterschiedliche Untergründe sorgen für verschiedene Vibrationsgeräusche, Fortgeschrittene: In der Gruppe massieren sich die Kinder gegenseitig.

Wie wird das Spielzeug adaptiert?

	1. Adaptieren kann man fast jedes batteriebetriebene Spielzeug oder Gerät, das über einen Ein- / Ausschalter verfügt.		6. Schließen Sie das Batteriefach wieder und schalten Sie das Gerät ein. Es wird nichts passieren, denn das Gerät ist jetzt adaptiert und funktioniert nur, wenn die externe Taste aktiviert wird.
	2. Öffnen Sie das Batteriefach. Ggf. wird dazu ein Schraubendreher benötigt.		7. Schließen Sie eine Taste an den Batterieunterbrecher an. Solange die Taste gedrückt wird, wird das Schwein laufen!
	3. Anhand der Batteriegröße erkennt man i.d.R., ob ein großer oder kleiner Batterieunterbrecher benötigt wird: BU-K für Lady, Micro und Mignon, BU-G für Baby & Mono.		8. Für erweiterte Möglichkeiten (zeitgesteuertes Aktivieren des Spielzeugs, abwechselndes Ein- / Ausschalten) verbinden Sie das Spielzeug mit einem SLAT (Switch Latch & Timer).
	4. Allerdings ist manchmal auch bei großen Batterien im Batteriefach nur Platz für einen kleinen Batterieunterbrecher.		9. Schließen Sie eine Taste an den SLAT an und wählen Sie eine Betriebsart. Das Schwein ist einsatzbereit!
	5. Um ein Abklemmen und Brechen des Batterieunterbrecherkabels zu vermeiden, wird eine Aussparung in die Klappe des Batterie-faches gefeilt.		10. Statt einer einfachen Taste können Sie auch die Funktaste JellyBeamer mit eingebautem SLAT verwenden. Wenn sich das Tier „verlaufen“ hat, kann man sich bei der Suche am Geräusch orientieren.

Informieren, Unterhalten oder Fortbilden – worauf haben Sie Lust?

Online-Schulungen



Zusätzlich zu unseren Präsenzveranstaltungen (Konferenzen, Seminare und Workshops) bieten wir auch internetbasierte Fortbildungen an. An den kostenfreien interaktiven Fortbildungen können Sie bequem vom PC oder Tablet aus teilnehmen.

www.prentke-romich.de/online-schulungen

Video-Anleitungen



Neben der Telefon-Hotline sind unsere Video-Anleitungen ein Service-Angebot, um Ihnen schnell und unkompliziert Hilfe-Stellung zu geben.

In kurzen Videos geben wir Ihnen Antworten und Unterstützung zu häufig gestellten Fragen.

Finden Sie gleich hier die Antworten:
www.prentke-romich.de/video-anleitungen

PRD-Tauschbörse

Sie finden auf www.prentke-romich.de/prd-tauschboerse eine Sammlung an Materialien, Ideen, Tipps und Tricks zu unseren Wortschatzprogrammen und Kommunikationsgeräten.

Diesen Schatz möchten wir teilen – mit Ihnen und für Sie!

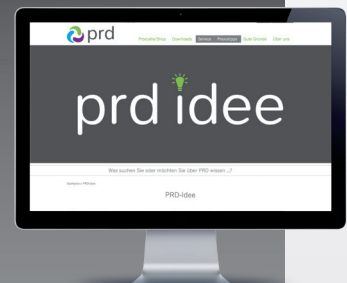


PRD Idee

Der Newsletter PRD Idee ist ein kostenloser Service von PRD.

Mehrmals im Jahr veröffentlichen wir darin Vorschläge und Praxistipps zum Einsatz von Kommunikationshilfen im Alltag.

<https://www.prentke-romich.de/prd-idee>



Mit guter Beratung für Sie vor Ort!

Zentrale Terminvergabe unter:
termine@prentke-romich.de

Deutschland: prentke-romich.de
Österreich: lifetool.at
Schweiz: activecommunication.ch



prentke romich deutschland
weil jede:r was zu sagen hat!

Karthäuserstraße 3 · 34117 Kassel
Telefon: 0561 785 59-0