


GoTalk 32+

Bedienungsanleitung

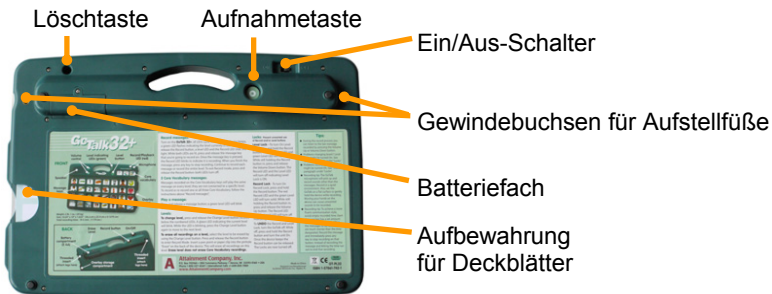

Aufnahmezeit:
10 Sekunden
pro Feld
17 Sekunden pro
Kernvokabular-
feld

Ein/Aus-Schalter, Aufnahme- und Löschtaste sowie Batteriefach befinden sich auf der Unterseite des Gerätes!

Einfache Kommunikationshilfen mit Sprachausgabe wie der GoTalk können vielfältig zur Kommunikationsanbahnung eingesetzt werden. Aussagen, die dauerhaft benötigt werden, sollten in den drei dafür reservierten Tasten für Kernvokabular gespeichert werden.

Aufnahmen von Mitteilungen

1. Schalten Sie den GoTalk ein. Sie hören einen Piepton.



2. Drücken Sie die Aufnahmetaste auf der Rückseite des Geräts. Die grüne LED der Ebenen-Anzeige und die rote Aufnahme-LED leuchten.

3. Drücken Sie kurz auf die Taste, unter der Sie eine Aussage speichern wollen.

4. Die rote Aufnahme-LED beginnt zu blinken und zeigt damit an, dass die Aufnahme läuft.

5. Sprechen Sie in normaler Lautstärke in Richtung des eingebauten Mikrofons (oben rechts auf der Oberseite des GoTalks).

6. Ist die Aussage zu Ende gesprochen, drücken Sie einfach irgendeine Taste des GoTalks, um die Aufnahme zu beenden.

7. Wiederholen Sie Schritt 3. - 6., bis Sie alle Tasten besprochen haben.

8. Haben Sie alle Tasten belegt, beenden Sie den Aufnahmemodus durch erneutes Drücken der Aufnahmetaste.

☞ Achten Sie darauf, dass Sie Aufnahmen nur in ruhigen Umgebungen durchführen.

Wiedergabe von Mitteilungen

Drücken Sie eine Taste, um die darunter gespeicherte Aussage wiederzugeben.

Die grüne LED der Ebenen-Anzeige blinkt und zeigt damit die aktive Ebene an.

Lautstärke anpassen

Zum Anpassen der Wiedergabelautstärke dienen die beiden großen Tasten auf der Vorderseite des GoTalks:



zum Erhöhen der Lautstärke



zum Verringern der Lautstärke

Jede Aktivierung einer dieser Tasten erhöht bzw. verringert die Lautstärke um eine Stufe. Insgesamt gibt es 7 Stufen.

Wird eine dieser Tasten während der Wiedergabe einer gespeicherten Aussage betätigt, wird die gesamte Aussage in der neuen Lautstärke wiederholt.

Ebenen

Der GoTalk32+ verfügt über 5 Vokabularebenen. Zum Wechsel der Ebene drücken Sie die grüne Ebenen-Wahltaste auf der Vorderseite des GoTalks. Die blinkende LED zeigt die aktive Ebene an. Drücken Sie die Ebenen-Wahltaste wiederholt, bis die LED der gewünschten Ebene aufleuchtet.

Ebenen löschen



1. Drücken Sie den Aufnahmeknopf auf der Rückseite des Geräts. Die grüne LED der Ebenen-Anzeige und die rote Aufnahme-LED leuchten.

2. Drücken Sie die Ebenen-Wahltaste wiederholt, bis die LED der zu löschenden Ebene aufleuchtet.

3. Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Kugelschreiber) den

Löschknopf „ERASE“ oben links auf der Unterseite des GoTalks.



4. Wiederholen Sie Schritt 2. - 3., wenn Sie weitere Ebenen komplett löschen wollen.

Unter Tasten für Kernvokabular gespeicherte Aussagen werden dabei nicht gelöscht.

Sperrfunktionen

Die Funktionen „Ebene wechseln“ und „Aufnahme“ können gesperrt werden, um ein unbeabsichtigtes Verstellen durch den Benutzer zu verhindern.

Ebenensperre



1. Drücken und halten Sie den Aufnahmeknopf auf der Rückseite des Geräts. Die grüne LED der Ebenen-Anzeige und die rote Aufnahme-LED leuchten.

2. Bei weiterhin gehaltener Aufnahmetaste drücken Sie die Taste „leiser“



einmal kurz.

3. Die grüne LED der Ebenen-Anzeige und die rote Aufnahme-LED erlöschen und zeigen damit an, dass die Ebenensperre eingeschaltet wurde.

Aufnahmesperre



1. Drücken und halten Sie den Aufnahmeknopf auf der Rückseite des Geräts. Die grüne LED der Ebenen-

Anzeige und die rote Aufnahme-LED leuchten.

- Bei weiterhin gehaltener Aufnahme-taste drücken Sie die Taste „lauter“



einmal kurz.

- Die grüne LED der Ebenen-Anzeige und die rote Aufnahme-LED erlischen und zeigen damit an, dass die Aufnahmesperre eingeschaltet wurde.

Entsperren

- Schalten Sie den GoTalk aus.



- Drücken und halten Sie den Aufnahmeknopf auf der Rückseite des Geräts.
- Schalten Sie den GoTalk bei weiterhin gehaltener Aufnahme-taste wieder ein. Lassen Sie die Aufnahme-taste los, wenn der Piepton ertönt ist.

Tasten für Kernvokabular



- Folgen Sie den Anweisungen zum Aufnehmen von Mitteilungen, um den 3 Kernvokabulartasten Aussagen zuzuweisen.
- Das den 3 Tasten zugewiesene Vokabular ist unabhängig von der gerade gewählten Ebene und bleibt erhalten, bis Sie es neu aufnehmen.

Diese Tasten sollten wichtige Aussagen enthalten, die der Benutzer des GoTalks immer benötigt. Dies können Informationen über die eigene Person sein, Begrüßungs- & Verabschiedungsfloskeln, Kom-

mentare, Fragewörter, „Ja“ / „Nein“ oder sonstige gesprächssteuernden Aussagen. Sollte der Benutzer des GoTalks „Ja“ und „Nein“ (oder andere der genannten Aussagen) auch ohne Hilfsmittel eindeutig mitteilen können, so sollten die entsprechenden Aussagen nicht gespeichert werden.

Deckblätter

Im Lieferumfang des GoTalks sind neben einigen von PRD gestalteten Deckblättern mehrere Blankodeckblätter enthalten, die Sie selber gestalten können.

Fertige Deckblätter können einfach von rechts seitlich in den GoTalk hineingeschoben werden. Zum Schutz der Deckblätter vor Verschmutzung verfügt der GoTalk über eine Kunststoffhülle, die das Deckblatt aufnehmen kann.

Nicht benötigte Deckblätter können in einem separaten Aufbewahrungsfach hinter der Tastatur verwahrt werden.

Deckblätter gestalten

- Gestalten Sie ein Deckblatt, indem Sie es mit Bildern, Symbolen oder Fotos versehen, die zu den gespeicherten Aussagen passen.
- Benutzen Sie die PRD-Bilder-CD, die METACM-Symbolsammlung oder Boardmaker® und eine der mitgelieferten Vorlagen, um ein Deckblatt auf dem Computer zu erstellen

Aufstellfüße

Wenn Sie den GoTalk dauerhaft in einer leicht schrägen Position benutzen wollen, so schrauben Sie die beiden mitgelieferten Aufstellfüße in die dafür vorgesehenen Gewindebuchsen in der Unterseite des GoTalks.

Deckblätter auswechseln



- Entfernen Sie das Deckblatt (mit der Kunststoffhülle) aus dem GoTalk, indem Sie die Kunststoffhülle nach rechts herausziehen.
- Legen Sie das neue Deckblatt in die Kunststoffhülle und schieben die Kunststoffhülle mit dem Deckblatt nach links in den GoTalk.

☞ Schreiben Sie auf ein Deckblatt, für welche Ebene es ist. Wenn Sie die Zahl ganz rechts außen in der Mitte des Deckblatts schreiben, dann können Sie sie stets durch die Deckblatt-Aussparung des GoTalks sehen.

Sie können nicht benötigte Deckblätter im GoTalk in dem dafür vorgesehenen Aufbewahrungsfach lagern. Dieses erreichen Sie über den zweiten, weiter hinten liegenden seitlichen Schlitz im GoTalk.



Stromversorgung und Batteriewechsel

Zur Verlängerung der Batterielebensdauer verfügt der GoTalk über einen separaten Ein/Aus-Schalter, der auf der Unterseite angebracht ist. Wird der GoTalk hierüber angeschaltet, werden die Batterien nicht belastet. Doch auch im eingeschalteten Zustand benötigt der GoTalk nur minimale Energie, wenn er nicht benutzt wird.



So schalten Sie den GoTalk aus

Schieben Sie den Schiebeschalter nach rechts in die Position „OFF“.

So schalten Sie den GoTalk ein

Schieben Sie den Schiebeschalter nach links in die Position „ON“.

Auch bei ausgeschaltetem GoTalk bleiben die im Gerät gespeicherten Aussagen selbstverständlich erhalten.

Der GoTalk wurde auf minimalen Energieverbrauch hin konzipiert. Mit den beiden mitgelieferten Alkali-Batterien (Typ AA / Mignon) ist ein monatelanger Einsatz möglich.

Der Ein/Aus-Schalter dient auch zum Rücksetzen („Reset“) der weiter vorne beschriebenen Funktionen „Ebenensperre“ und „Aufnahmesperre“.

Wechsel der Batterien

Die Batterien sind im Batteriefach untergebracht, das von der Unterseite des GoTalks aus zugänglich ist. Damit die Batterien z.B. bei einem Herunterfallen des GoTalks nicht herausfallen, ist die Batteriefachklappe mit einer Schraube gesichert. Zum Öffnen des Batteriefachs

benötigen Sie daher einen Kreuzschlitzschraubendreher.

Die Batterien sollten gewechselt werden, wenn Sie das Gefühl haben, dass die Aufnahmen bei der Wiedergabe komisch verzerrt klingen oder die Lautstärke immer schwächer wird.

Drehen Sie die Schraube heraus und entnehmen Sie die Batteriefachklappe.



Entnehmen Sie die alten Batterien und legen Sie die neuen ein. **Achten Sie auf die richtige Polung!** Die Polung ist im Boden des Batteriefachs eingraviert. Die Pluspole zeigen jeweils nach links. Setzen Sie die Batteriefachklappe wieder ein und schließen Sie sie mit Hilfe der Kreuzschraube.



Batterien sind Sondermüll und gehören nicht in den Mülleimer! Entleerte Batterien können Sie kostenlos über die dafür vorgesehenen Sammelbehälter entsorgen, die Sie überall dort finden, wo Sie Batterien käuflich erwerben können.



Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen. Privathaushalte können ihre gebrauchten elektronischen Produkte an vorgesehenen Sammeleinrichtungen kostenfrei zurückgeben oder aber an den Händler zurückgeben, von dem sie es erworben haben.

Technische Daten

Maße und Gewicht

Breite	36 cm
Höhe	25,2 cm
Tiefe	4,2 cm
Gewicht:	928 g

Deckblätter	Breite	Höhe
Tastatur	34,4 cm	16 cm
Kernvokabular	10,5 cm	3,1 cm

Tasten	Breite	Höhe
Standardtasten	3,2 cm	2,8 cm
Kernvokabular	2,7 cm	2,3 cm

Aufnahmezeit: 27,5 Minuten (5 Min. 20 Sek. je Ebene)

Reinigung

Bei Verschmutzung wischen Sie den GoTalk mit einem feuchten (nicht nasen!) Tuch ab.

Gewährleistung

Prentke Romich GmbH und Attainment Company Inc. geben Ihnen auf dieses Produkt 24 Monate Gewährleistung. Von der Gewährleistung ausgenommen sind Batterien sowie Schäden aufgrund mechanischer Belastung (z.B. Sturz) und nicht ordnungsgemäßer Benutzung.



Prentke Romich GmbH
Elektronische Kommunikationshilfen
Goethestr. 31
D-34119 Kassel
Tel. (05 61) 7 85 59-0
Fax (05 61) 7 85 59-29
eMail info@prentke-romich.de
Web www.prentke-romich.de