


Attainment Company's  
**GoTalk™ Pocket**

**Anleitung**

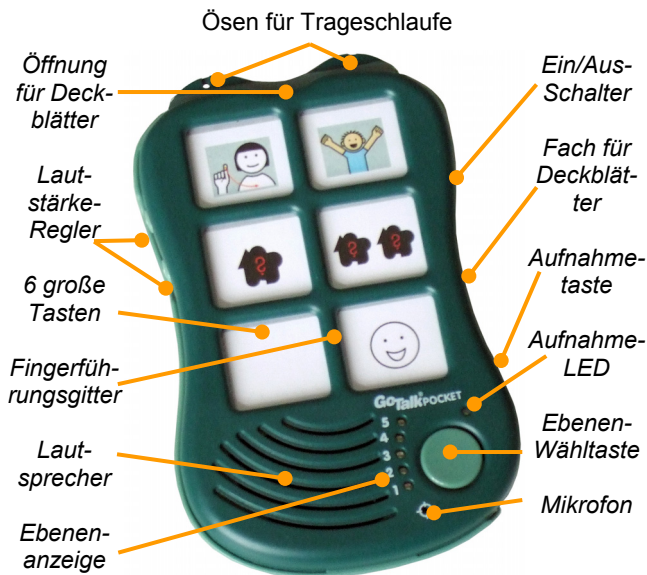

**PRD**

Prentke Romich Deutschland  
Kommunikation ohne Grenzen

## Aufnahme von Mitteilungen

- Schalten Sie den GoTalk Pocket ein.
- Drücken Sie einmal kurz die Aufnahme-Taste auf der rechten Seite. Die LEDs **Aufnahme** und **Ebene** leuchten.
- Drücken Sie einmal kurz die Taste, unter der Sie eine Aussage speichern wollen. Die rote Aufnahme-LED beginnt zu blinken.
- Sprechen Sie die Mitteilung in das Mikrofon.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Aufnahme zu beenden.
- Nehmen Sie weitere Tasten der aktuellen Ebene auf.
- Beenden Sie den Aufnahmemodus durch erneutes Drücken der Aufnahme-Taste.

## Wiedergabe von Mitteilungen

- Drücken Sie eine Taste, um die zugehörige Aussage wiederzugeben.

## Ebenenwechsel

- Drücken Sie die Ebenen-Wähltaste. Die LED der aktuell gewählten Ebene blinkt.
- Drücken Sie die Ebenen-Wähltaste wiederholt, um die gewünschte Ebene auszuwählen.
- Legen Sie ein zur Belegung der gewählten Ebene passendes Deckblatt ein.

## Löschen einer Ebene

- Entfernen Sie alle Deckblätter aus dem Aufbewahrungsfach auf der Rückseite des GoTalk Pocket.
- Drücken Sie einmal kurz die Aufnahme-Taste auf der rechten Seite. Die LEDs **Aufnahme** und **Ebene** leuchten.
- Drücken Sie die Ebenen-Wähltaste wiederholt, bis die Ebenen-LED der zu löschenden Ebene aufleuchtet.
- Drücken Sie mit einem Kugelschreiber oder einem ähnlich spitzen Gegenstand den Löschknopf (**ERASE**) auf der Rückseite des GoTalk Pocket. Sämtliche Mitteilungen der gewählten Ebene werden dadurch gelöscht.



- Drücken Sie die Aufnahme-Taste auf der rechten Seite erneut, sobald der Löschvorgang beendet ist.
- Wiederholen Sie die Schritte, um weitere Ebenen zu löschen.

## Ebenen- und Aufnahmesperre

- Um einen Ebenenwechsel zu verhindern, halten Sie die Aufnahme-Taste fest und drücken gleichzeitig kurz die Taste „**Leiser**“. Die LEDs **Aufnahme** und **Level** erlöschen.
- Um das Aufnehmen von Mitteilungen zu verhindern, halten Sie die Aufnahme-Taste fest und drücken gleichzeitig kurz die Taste „**Lauter**“. Die LEDs **Aufnahme** und **Level** erlöschen.
- Um die Ebenensperre und/oder Aufnahmesperre zu beenden, schalten Sie den GoTalk Pocket aus. Halten Sie die Aufnahme-Taste fest und schalte Sie den GoTalk Pocket mit gedrückter Aufnahme-Taste wieder ein. Die LEDs **Aufnahme** und **Level** leuchten einmal kurz auf und ein Piepton ertönt.

Zur Unterbringung nicht benötigter Deckblätter dient die abnehmbare **Deckblattaufbewahrung** auf der Rückseite des GoTalk Pocket. Befestigen Sie dazu den hellgrünen Plastikdeckel am GoTalk Pocket; er schnappt einfach auf der Rückseite ein.



Mit Hilfe des mitgelieferten **Umhängebands** kann der GoTalk Pocket einfach mitgeführt werden.

## Batteriewechsel

Zum Wechsel der Batterien öffnen Sie die Schraube des Batteriefachdeckels. Setzen Sie 3 frische Batterien vom Typ AAA richtig gepolt ein. Verschließen Sie das Batteriefach wieder. **Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese ausschließlich über den Handel oder die speziell dafür eingerichteten Sammelstellen!**



## Deckblätter erzeugen

5 Blankodeckblätter werden mitgeliefert. Um Deckblätter für den GoTalk Pocket zu gestalten, verwenden Sie die **PRD-Bilder-CD**, die Symbolsammlung **METACOM** oder die Software **Boardmaker**®, die Sie bei Prentke Romich Deutschland beziehen können.

## Didaktische Materialien

Für den GoTalk Pocket gibt es exklusiv bei Prentke Romich Deutschland eine Version der Materialsammlung **Entdecke die Kraft der Sprache**.

## Hinweise zur Entsorgung



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte gekennzeichnet. Nutzen Sie die von Ihrer Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte.



# PRD

Prentke Romich Deutschland  
Kommunikation ohne Grenzen

## Prentke Romich GmbH

Goethestr. 31  
D - 34119 Kassel  
Tel. (0561) 7 85 59-0  
Fax (0561) 7 85 59-29  
eMail [info@prentke-romich.de](mailto:info@prentke-romich.de)  
Web [www.prentke-romich.de](http://www.prentke-romich.de)