


Recordable Pegs

Anleitung

Recordable Pegs ist ein Set von 6 sprechenden Tasten mit jeweils 10 Sekunden Kapazität.

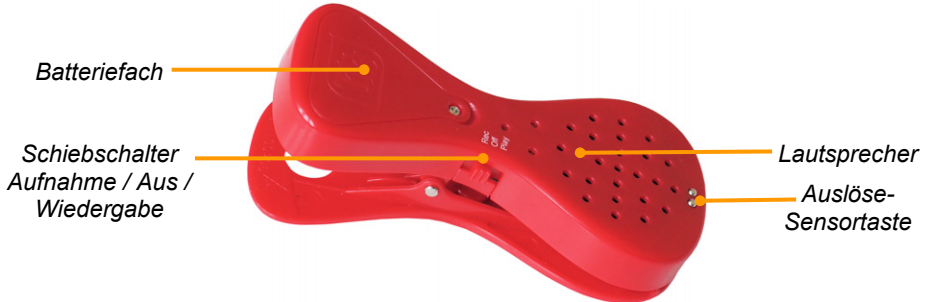

Aufnahmen einer Mitteilung

- Schieben Sie den seitlichen Schiebeschalter in die Position „Rec“ (Aufnahme).
- Berühren Sie die Sensortaste. Sie hören einen Piepton und die grüne LED beginnt zu leuchten.
- Sprechen Sie die Mitteilung in das Mikrofon.
- Berühren Sie die Sensortaste erneut, sobald Sie die Mitteilung zu Ende gesprochen haben. Zwei Pieptöne zeigen an, dass die Aufnahme beendet wurde.
- Schieben Sie den seitlichen Schiebeschalter wieder in die Position „Play“ (Wiedergabe).

Wiedergeben einer Mitteilung

- Berühren Sie die Sensortaste.

Recordable Peg aus- und einschalten

- Zum Ausschalten schieben Sie den seitlichen Schiebeschalter in die Position „Off“.
- Zum Einschalten schieben Sie den seitlichen Schiebeschalter in die Position „Play“.

Batterien wechseln

- Lösen Sie die Schraube im Batteriefachdeckel. Sie benötigen einen passenden Kreuzschlitzschraubendreher.
- Öffnen Sie die Batteriefachklappe.
- Legen Sie 3 Batterien vom Typ AG13 / LR44 richtig gepolt ein.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Setzen Sie die Batteriefachschraube wieder ein und ziehen Sie sie fest.
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese ausschließlich über den Handel oder die speziell dafür eingerichteten Sammelstellen!

Hinweise zur Entsorgung



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte gekennzeichnet. Nutzen Sie die von Ihrer Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte.



PRD

Prentke Romich Deutschland
Kommunikation ohne Grenzen

Prentke Romich GmbH

Goethestr. 31

D - 34119 Kassel

Tel. (0561) 7 85 59-0

Fax (0561) 7 85 59-29

E-Mail info@prentke-romich.de

Web www.prentke-romich.de