

# LADEN DES QK60-ADJEKTIVMODULS

Prentke Romich GmbH  
Tel.: 0561-78559-0 · Fax: 0561-78559-29  
Goethestr. 31 · D-34119 Kassel  
Internet: [www.prentke-romich.de](http://www.prentke-romich.de) · E-Mail: [info@prentke-romich.de](mailto:info@prentke-romich.de)



## WICHTIGER HINWEIS

Das Laden geschieht auf eigene Gefahr!

Für eventuellen Datenverlust sowie Fehler an Hard- oder Software, die aufgrund des Ladens des QK60-Adjektivmoduls auftreten, übernimmt die Prentke Romich GmbH keinerlei Haftung. Dies erkennt der Kunde bei Ausführung an.


**FÜHREN SIE VOR DEM LADEN DES MODULS AUF JEDEN FALL EINE DATENSICHERUNG (SPEICHERÜBERTRAGUNG) DES AKTIVEN BENUTZERBEREICHS SOWIE DES GESAMTEN GERÄTEINHALTS DURCH!**

## ANLEITUNG


1. Sichern Sie das in Ihrem SmallTalker / XL-Talker / EcoTalker aktuell enthaltene Vokabular. Notieren Sie zusätzlich die in den Menüs ANSTEUERUNG, FEEDBACK und SPRACHE gemachten Einstellungen.
2. Laden Sie das Adjektivmodul für die Quasselkiste 60 von unserer Homepage [www.prentke-romich.de](http://www.prentke-romich.de) herunter.
3. Entpacken Sie das Archiv. Sie sollten diese Anleitung sowie die Datei „Adjektivmodul QK60.mti“ erhalten.
4. Kopieren Sie die Datei „Adjektivmodul QK60.mti“ auf einen USB-Stick und schließen Sie diesen an den Talker an.
5. Öffnen Sie die Toolbox des Talkers und wählen Sie das Menü SPEICHERÜBERTRAGUNG.




6. Wählen Sie im Menü **SPEICHERÜBERTRAGUNG** die Option „Benutzerbereich laden“

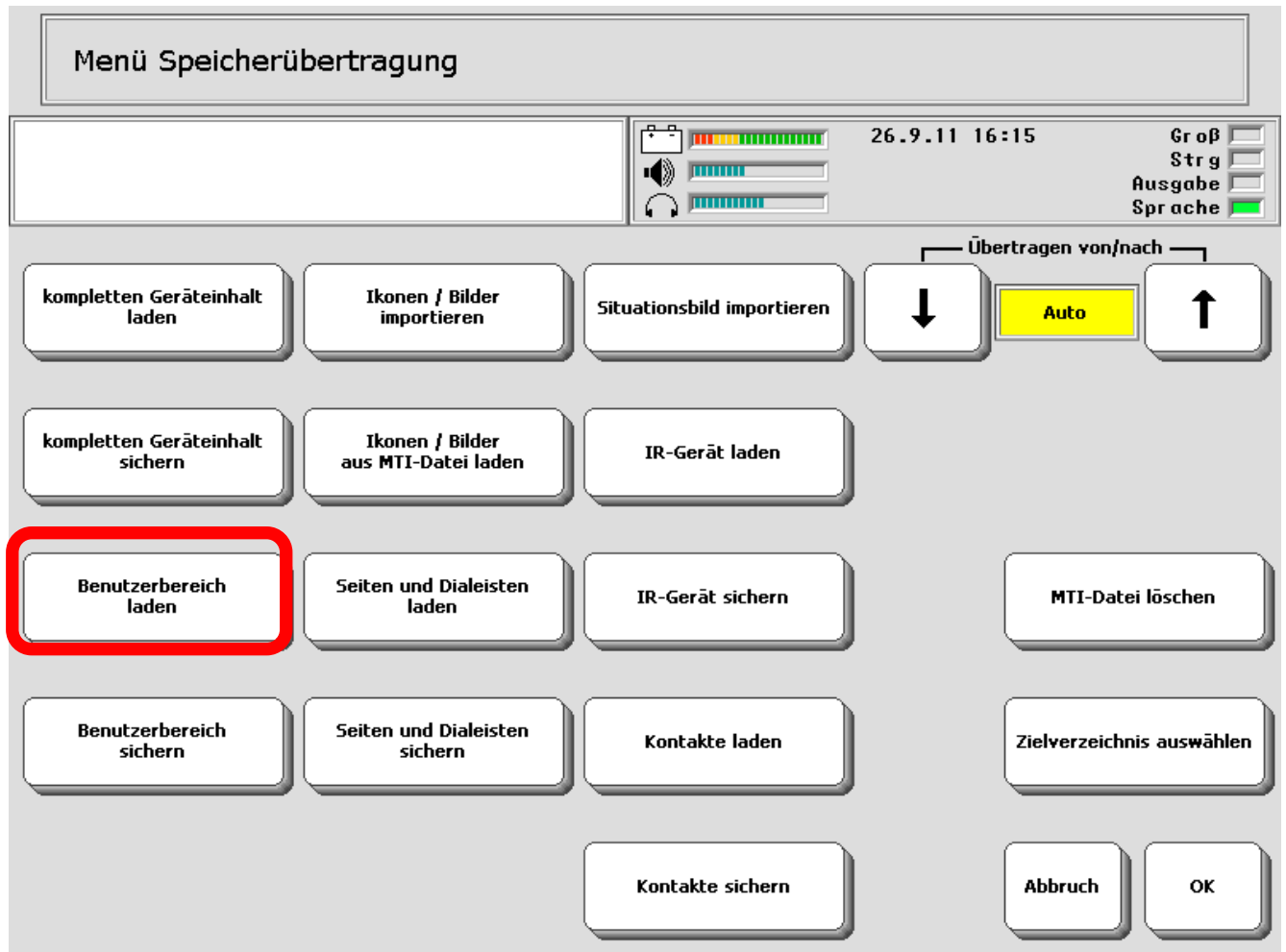


7. Wählen Sie als Benutzerbereich den aktiven Benutzerbereich des Talker-Benutzers, in dem sich die Quasselkiste 60 (ohne Adjektivmodul) befindet.

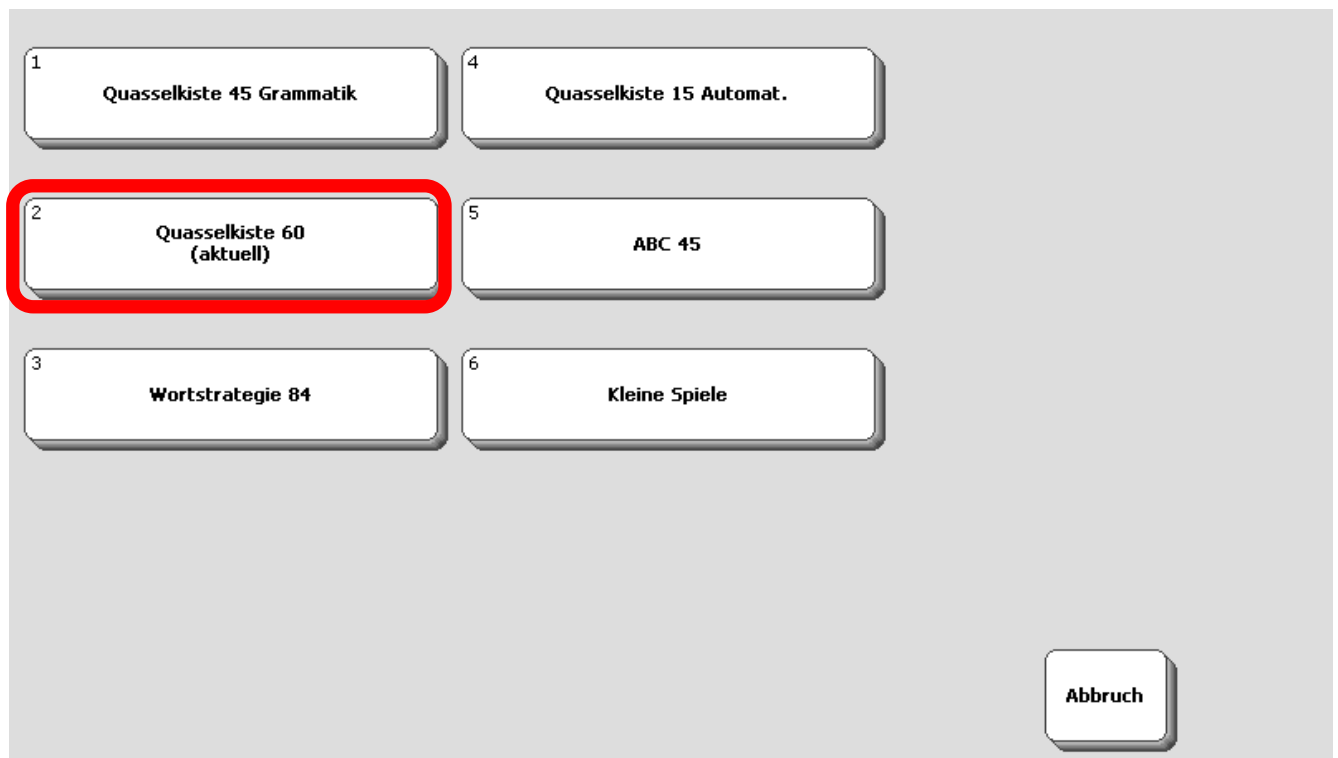

8. **WICHTIG:** Um das existierende Vokabular zu behalten, wählen Sie „Nein“:

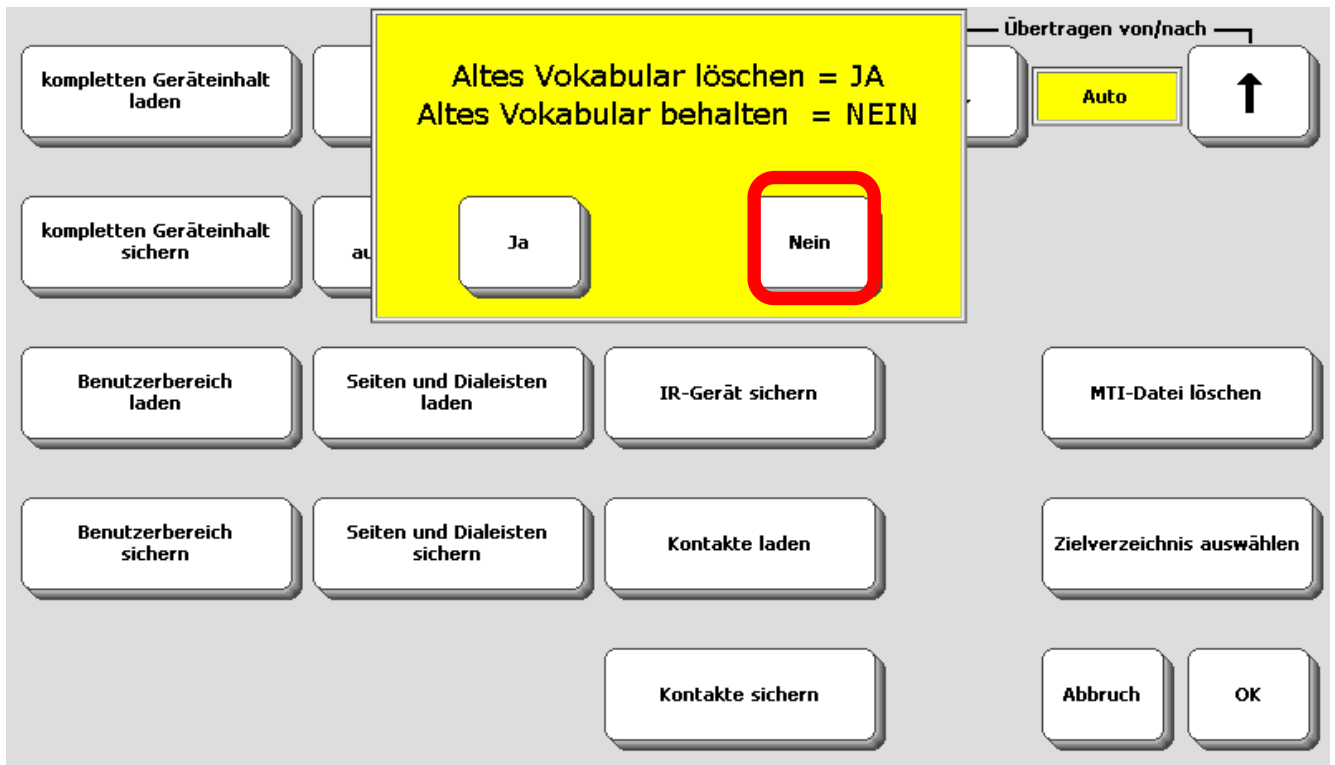

9. Wählen Sie die Datei mit dem Adjektivmodul für die Quasselkiste 60:

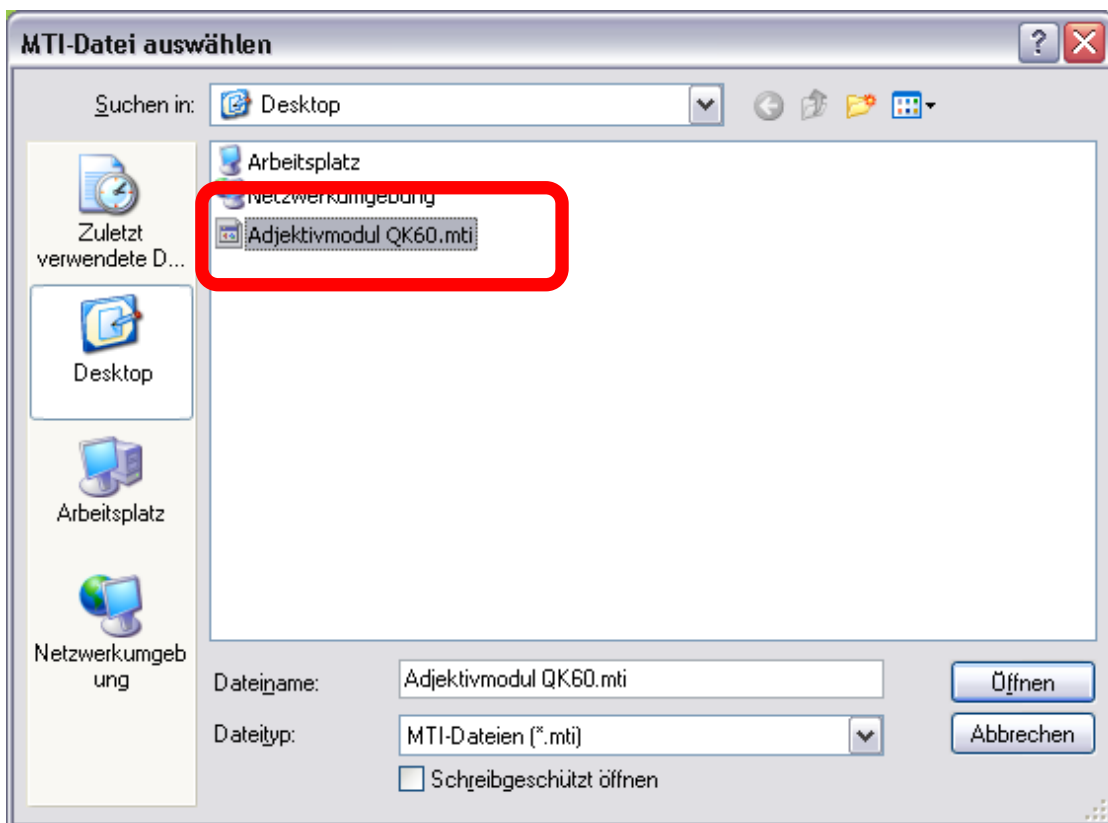


10. Warten Sie den Ladevorgang ab.



11. Schließen Sie das Menü SPEICHERÜBERTRAGUNG. Wählen Sie das Menü DECKBLATT UND BENUTZERBEREICH.

12. Wählen Sie die Option „Benutzerbereich umbenennen“.

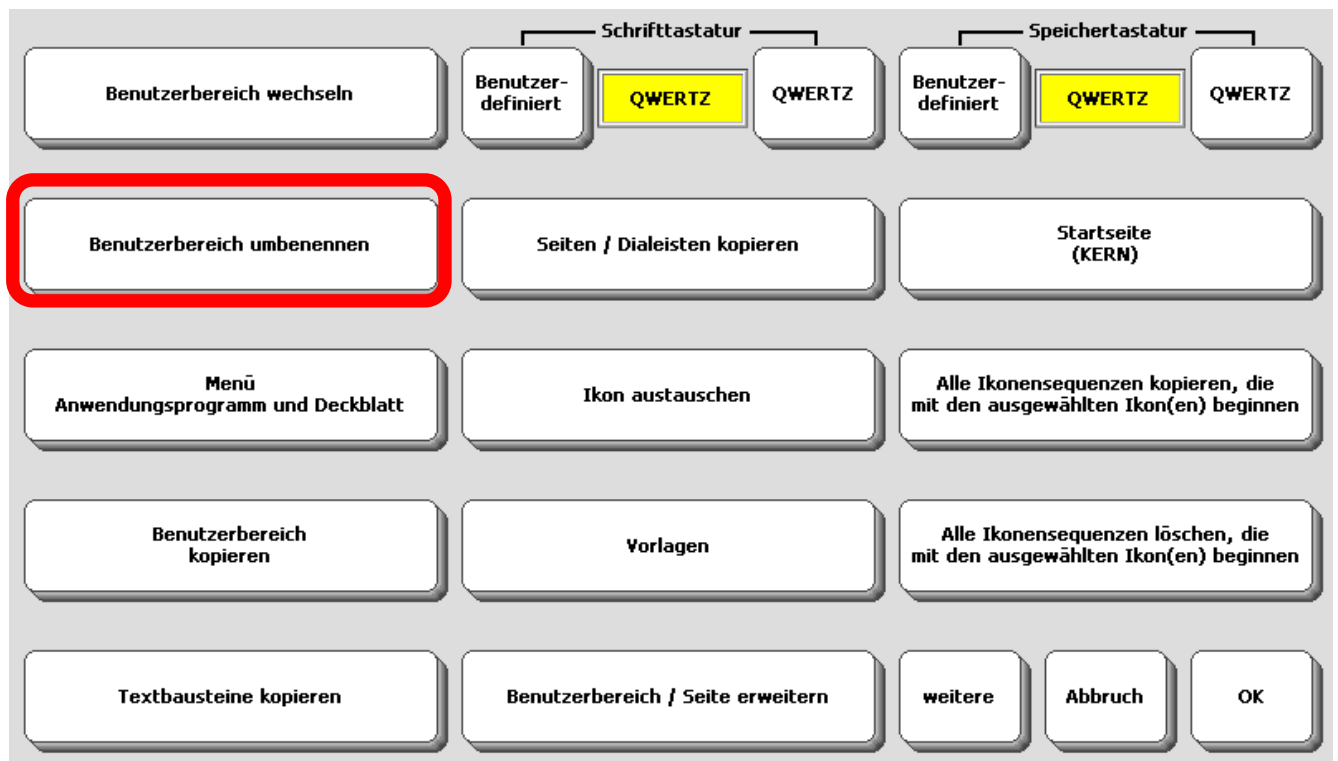

13. Der Benutzerbereich wurde durch das Modul umbenannt in „Adjektiv Modul“. Geben Sie dem Benutzerbereich wieder einen eindeutigen Namen mit Bezug zum Talker-Benutzer.

14. Schließen Sie das Menü DECKBLATT UND BENUTZERBEREICH und die Toolbox.

 STANDARD	 ABC	 BASTELN	 PLAUDERN	 STANDAR					
									
									
									
									
									

[illegible]