

ablenet[®]

Kurzanleitung:


Relax™

Lernfunktion der IR-Fernbedienung


www.ablenetinc.com
1-800-322-0956

PN 98000042 (10/14 Rev. A - FN 70500204)

Funktionsmerkmale

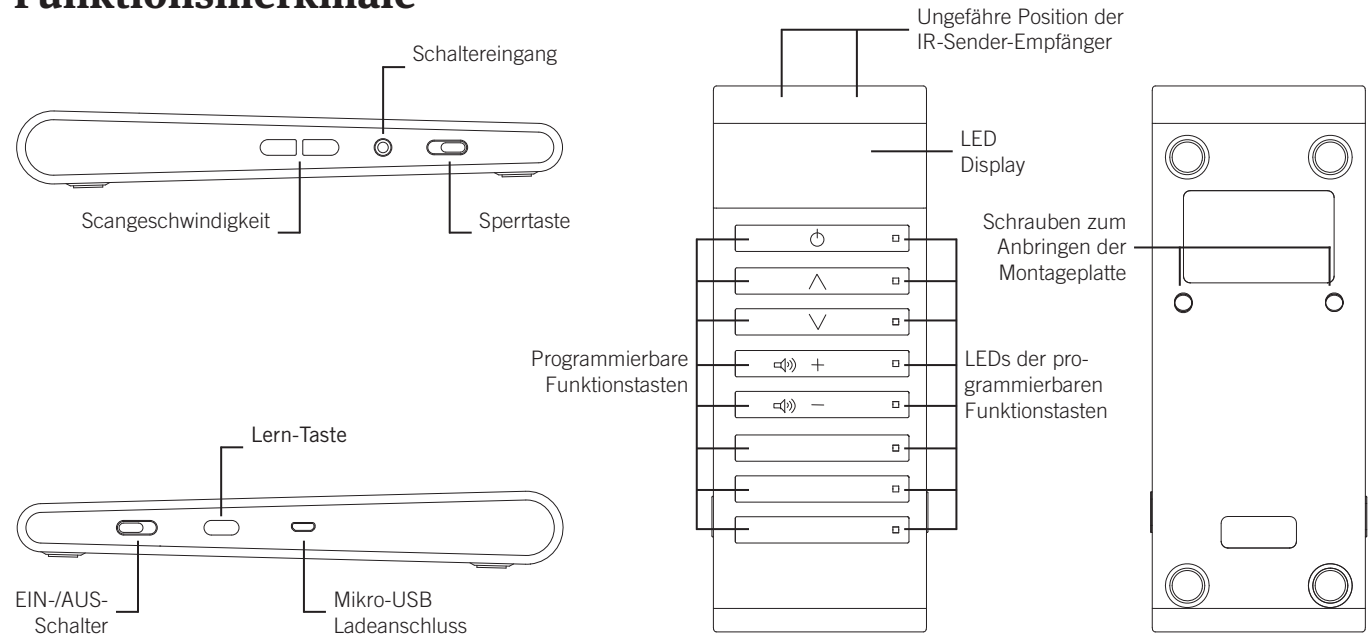

Laden

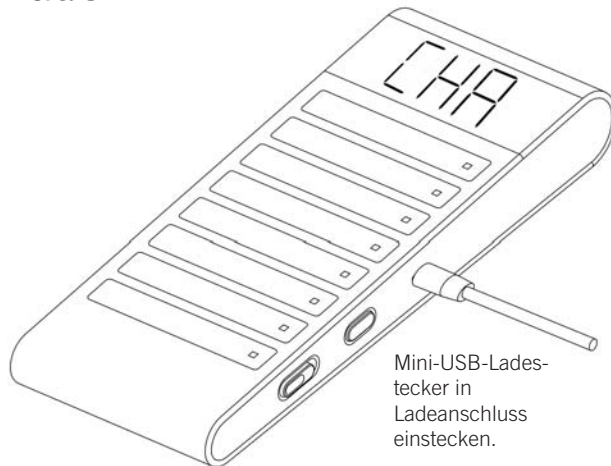

Mini-USB-Ladestecker in Ladeanschluss einstecken.


CHA = Laden

FUL = Vollständig geladen

Program

Anders als manche Universal-Fernbedienungen, die mit einem Code die gesamte Fernbedienung auf einmal programmieren, zeichnet die Fernbedienung Relax das IR-Signal Ihrer Fernbedienung auf und programmiert jede Funktion einzeln. Sie legen fest, für welche programmierbare Funktionstaste auf der Fernbedienung Relax das IR-Signal aufgezeichnet wird und Sie können bis zu acht unterschiedliche Funktionen auf die Fernbedienung Relax programmieren. Befolgen Sie diese Anleitung, um Ihre Fernbedienung Relax zu programmieren.

1. Schalten Sie die Fernbedienung Relax EIN.
2. Halten Sie die Lern-taste ungefähr 5 Sekunden gedrückt, bis **LRN** am LED-Display erscheint.
3. Wählen Sie eine programmierbare Funktionstaste, für die Sie aufzeichnen wollen. Nach erfolgter Auswahl wird die LED der programmierbaren Funktionstaste rot leuchten.
4. Positionieren Sie die IR-Fernbedienung wie abgebildet.
5. Aktivieren Sie die gewünschte Funktion an der IR-Fernbedienung. Wenn die Fernbedienung Relax das IR-Signal erfolgreich aufgezeichnet hat, wird die LED der programmierbaren Funktionstaste orange leuchten.
6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, um weitere Funktionstasten zu programmieren.
7. Wenn Sie alle gewünschten Funktionstasten an der Fernbedienung Relax programmiert haben, drücken Sie die Lern-taste und **LRN** wird nicht mehr am LED-Display angezeigt.

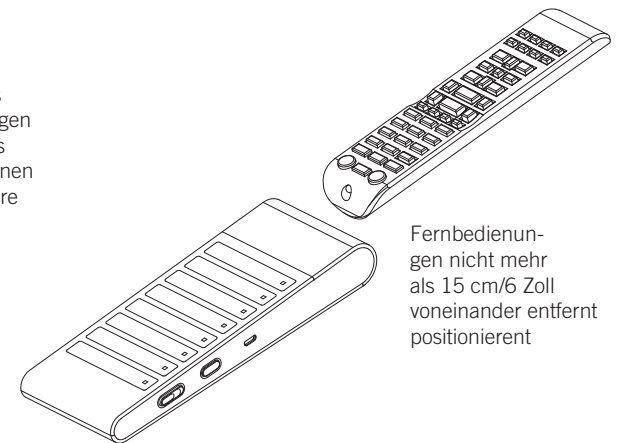

Fernbedienungen nicht mehr als 15 cm/6 Zoll voneinander entfernt positionieren

Gebrauch

Direktwahl:

Drücken Sie eine beliebige programmierbare Funktionstaste, um die gewünschte Funktion zu aktivieren.

Bevor die Schalter-Scanfunktion genutzt werden kann, muss die Relax-Fernbedienung programmiert werden.

Einstellung der Schalter-Scanfunktion

1. Schalten Sie die Relax-Fernbedienung ein, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter aus der Position 0 in die Position I schieben.
2. Stellen Sie die gewünschte Sekundenzahl von 1 bis 10 für die Scan-Rate mit der Taste Scangeschwindigkeit + oder - ein. Die Scan-Rate ist der Zeitraum, der benötigt wird, um zwischen den programmierbaren Funktionstasten an der Relax-Fernbedienung umzuschalten, nachdem ein Schalter betätigt wurde.
3. Wenn die Scan-Rate eingestellt ist, stecken Sie einen 3,5 mm Schalterstecker in den Schaltereingang der Relax-Fernbedienung ein.

Verwenden der Schalter-Scanfunktion

4. Um den Scan zu starten, drücken Sie den Schalter einmal. An der Relax-Fernbedienung bewegt sich der Scan von oben nach unten. Während der Scan sich durch die Relax-Fernbedienung bewegt, wird die LED an jeder programmierbaren Funktionstaste leuchten, um anzuzeigen, welche Option der Benutzer aktuell auswählen kann.
5. Zur Auswahl einer programmierbaren Funktionstaste betätigen Sie den Schalter einmal.

Es ist möglich, dieselbe programmierbare Funktionstaste mehrfach zu betätigen, ohne den gesamten Scan durchlaufen zu müssen. Die Zeit, in der der Scan auf derselben programmierbaren Funktionstaste verbleibt, ist durch die zuvor eingestellte Scan-Rate festgelegt. Wenn die Scan-Rate zum Beispiel auf fünf Sekunden eingestellt wurde und der Benutzer eine programmierbare Funktionstaste auswählt, um den Kanal hochzuschalten, bleiben ihm fünf Sekunden, um den Schalter erneut zu betätigen und dieselbe Funktion zum Hochschalten des Kanals erneut auszuwählen. Wenn die fünf Sekunden verstrichen sind, wird der Scan wieder oben an der Relax-Fernbedienung starten.

Der Scan an der Relax-Fernbedienung läuft drei volle Zyklen von oben nach unten. Wenn kein Schalter betätigt wurde, nachdem der dritte Zyklus beendet ist, wird die Scanfunktion beendet. Sie können den Scan dann erneut starten, indem Sie den Schalter einmal betätigen.

Einstellen und Verwenden der Einzelfunktionsschalter

Mit der Relax-Fernbedienung kann der Benutzer einen Schalter verwenden, um eine einzelne Funktion an der Fernbedienung zu aktivieren.

1. Schalten Sie die Relax-Fernbedienung ein, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter aus der Position 0 in die Position I schieben.
2. Stecken Sie einen 3,5-mm-Schalterstecker in den Schaltereingang an der Relax-Fernbedienung.
3. Betätigen Sie den Schalter einmal. Sie werden sehen, dass der Scan oben an der Relax-Fernbedienung beginnt. Die LED der programmierbaren Funktionstasten leuchten orange, wenn der Scan die jeweilige Funktion erreicht hat.
4. Wenn der Scan die programmierbare Funktionstaste erreicht hat, die Sie mit dem Schalter steuern wollen, bewegen Sie den Sperrschalter in die „gesperrte“ Position.
5. Bei jedem Betätigen des Schalters wird nun die ausgewählte Funktion aktiviert und jedes Mal, wenn der Schalter aktiviert wird, zeigt das LED-Display an der Relax-Fernbedienung „LOC“ an.

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und befindet sich gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen innerhalb der Grenzen für ein Digitalgerät der Klasse B. Diese Grenzwerte dienen dazu, in Wohngebieten einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen sicherzustellen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann Hochfrequenzstrahlen abgeben. Wenn das Gerät nicht anleitungsgemäß installiert oder verwendet wird, kann es schädliche Funkstörungen verursachen. Es wird jedoch keine Garantie dafür übernommen, dass in einer bestimmten Installation keine Störung auftritt. Sollte dieses Gerät den Radio- und Fernsehempfang stören, was durch ein Ein- und Ausschalten des Gerätes bestätigt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Vom AbleNet Technical Support oder von einem lokalen Distributor beraten lassen.

Tricks, Tipps und Garantie

LED Display

	Ziffern zur Anzeige der Scan-Zeit Anzeige erfolgt von 1,0 bis 10,0 Sekunden – in Schritten von 0,5
	Relax wird geladen
	Funktion wurde am Relax gelöscht
	Relax ist vollständig geladen
	Relax-Batterie ist leer
	Relax ist in einer bestimmten Position für den Schalter gesperrt
	Relax ist im Lern-Modus

Alle programmierten Funktionen löschen:

Um alle programmierten Funktionen an der Relax-Fernbedienung zu löschen, halten Sie die Lern-Taste ungefähr 10 Sekunden lang. Das LED-Display wird fünf Mal „dEL“ blinken. Wenn Sie eine programmierbare Funktionstaste drücken, nachdem sie gelöscht wurde, wird am LED-Display „dEL“ angezeigt.

An manchen Fernbedienungen müssen Sie eine Funktion eventuell mehr als einmal programmieren.

Abmessungen: 184 x 76 x 25 mm [7,25 x 3 x 1 Zoll]

Gewicht: 225 Gramm [8 oz]

Batterie: Li-Ion – wiederaufladbar

Sichtfeld: 110 Grad

Betriebstemperatur: 0 - 40 °C, 32 - 105 °F

Schaltereingang: 3,5 mm (1/8 "), Monostecker

Garantieinformationen

Für alle von AbleNet hergestellten Produkte gilt eine zweijährige Garantie. Diese Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler und gilt für zwei Jahre ab Kaufdatum. Den vollständigen Garantietext können Sie zusammen mit Informationen zu Rückgabe und Reparatur auf www.ablenetinc.com einsehen.

Mehr Informationen über die Produkte und Dienstleistungen von AbleNet erhalten Sie von:

AbleNet, Inc.
Minneapolis/St. Paul, MN
800-322-0956
www.ablenetinc.com