


NOVACHAT 5

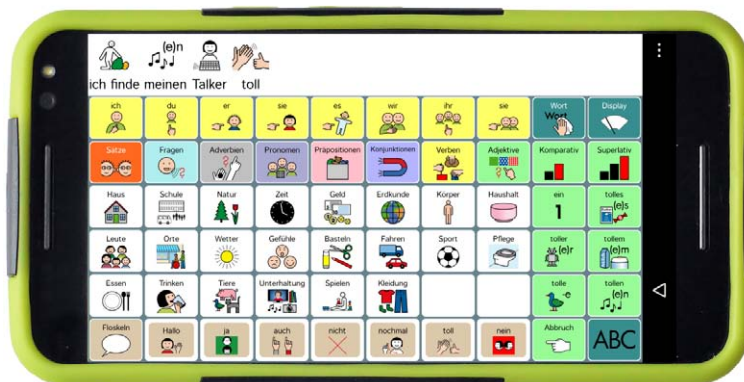

NC 5.3 / MXS / XT1572

HARDWARE-MANUAL



PRD

Prentke Romich Deutschland
Kommunikation ohne Grenzen

Hinweise

NovaChat, ChatFusion, ChatPC und Chat sind Warenzeichen der Saltillo Corporation.
MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings. LLC.
Android, Google und andere Marken sind Eigentum von Google Inc.
Acapela ist ein Warenzeichen der Acapela Group.
Ivona Copyright © 2001-2017, IVONA Software Sp. z o.o.
METACOM ist ein Warenzeichen von Annette Kitzinger.
SymbolStix ©News2You. „Die mitgelieferte Bibliothek mit Buchstaben- und Logo-Symbolen darf nur zu Zwecken der Unterstützten Kommunikation verwendet und nicht veräußert, kopiert oder für kommerzielle Zwecke verwertet werden.“
Picture Communication Symbols ist ein Warenzeichen der Dynavox Mayer-Johnson Inc.
Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation
Weitere hier verwendete Produkt- und Firmenbezeichnungen können Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Chat-Editor-CD

Chat-Editor ist Eigentum der Saltillo Corporation.
„Microsoft Voices“ sind Eigentum der Microsoft Corporation.
Saltillo erteilt die Berechtigung zur Nutzung des Chat-Editors auf jedem Computer, der zur Synchronisation / zum Datenaustausch mit dem NovaChat verwendet wird.

NovaChat 5.3 Hardwar-Manual geschrieben von Jürgen Babst
Version 1.0 • Januar 2017
© Prentke Romich GmbH 2017

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden. Prentke Romich GmbH geht damit keinerlei Verpflichtung ein. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Prentke Romich Company oder der Prentke Romich GmbH sind die vollständige oder teilweise Fotokopie und Reproduktion dieses Handbuchs sowie die Übersetzung in andere Sprachen nicht zulässig.
Prentke Romich GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen für diese Unterlagen. Das gilt ohne Einschränkung auch für implizite Garantien auf Marktgängigkeit und Eignung des NovaChat 5 oder der hierin gemachten Angaben für einen bestimmten Zweck. Auch übernimmt die Prentke Romich GmbH über die gesetzliche Produkthaftung hinaus keine Haftung für irgendwelche Schäden, die sich aus der Anwendung und Nutzung des NovaChat 5 oder der hierin gemachten Angaben ergeben.

Änderungen und Modifikationen am Gerät, die ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Saltillo Corporation vorgenommen wurden, können zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht laut Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EWG den Grenzwerten für Medizinprodukte der Klasse 1.

FCC-Bestimmungen

Dieses Gerät wurde typengeprüft und entspricht laut Abschnitt 15 der Bestimmungen der US-Funk- und Fernmeldebehörde (Federal Communications Commission, FCC) den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B. Diese Bestimmungen dienen dazu, in Wohnräumen einen angemessenen Schutz gegen Funkstörungen zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet HF-Energie und strahlt diese u.U. auch ab. Bei unsachgemäßer Installation und unsachgemäßem Betrieb, die von den Anweisungen des Herstellers abweichen, kann eine Funkstörung auftreten. In bestimmten Installationen ist das Auftreten von Störungen jedoch nicht auszuschließen. Sollte dieses Gerät den Empfang von Funk- und Fernsehsendungen stören (feststellbar durch das Ein- und Ausschalten dieses Gerätes), können die folgenden Behebungsmaßnahmen einzeln oder im Verbund eingesetzt werden:

- Verlegung oder Neuausrichtung der Empfangsantenne.
- Aufstellung des Gerätes in einer größeren Entfernung vom Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an eine andere Steckdose, so dass dieses Gerät und der Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.
- Gegebenenfalls kann der Fachhändler oder ein erfahrener Funk- und Fernstehtechner weitere Ratschläge geben.

Umgebungsbedingungen

Temperatur der Betriebsumgebung während der Benutzung: 0°C - 45°C, Temperatur bei Lagerung: -20°C - 50°C, relative Luftfeuchtigkeit max. 90% bei Umgebungstemperaturen unter 40°C.



















Prentke Romich GmbH

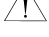Goethestr. 31
D - 34119 Kassel
Tel. (05 61) 7 85 59-0
Fax (05 61) 7 85 59-29
E-Mail info@prentke-romich.de
Web www.prentke-romich.de

Sicherheitshinweise

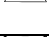Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit internationalen Sicherheitsstandards entwickelt und hergestellt. Wie bei jedem anderen Elektrogerät müssen Sie jedoch die gebührende Vorsicht walten lassen, um eine optimale Funktionsweise und Sicherheit zu gewährleisten. Bitte lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die folgenden Hinweise sorgfältig durch.

-
-  Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
-
-  Den NovaChat niemals in Wasser eintauchen oder in feuchten Räumen betreiben. Vor Feuchtigkeit schützen!
-
-  Überprüfen Sie, ob alle elektrischen Kabel, einschließlich des Netzkabels des Ladegeräts, evtl. Verlängerungskabel und der internen Verbindungen zwischen den einzelnen Gerätekomponenten ordnungsgemäß und entsprechend den Richtlinien des Herstellers angeschlossen wurden.
-
-  Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie neue oder zusätzliche Komponenten (Netzteil, Tasten, Kabel, Speichermedien etc.) anschließen oder entfernen.
-
-  Der NovaChat verfügt über keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
-
-  Entfernen Sie KEINE fest angebauten Gehäuseteile, da dadurch gefährliche Spannungen freigesetzt werden könnten!
-
-  Der im NovaChat eingebaute Lithium-Ionen-Akku darf niemals in der Nähe von offenem Feuer oder in Umgebungen mit Temperaturen oberhalb von 45° C gelagert werden, da der Akku explodieren könnte. Den Akku nicht öffnen. Sollte der Akku ausgetauscht werden müssen, den alten Akku nicht über den Hausmüll entsorgen, sondern an einer der öffentlichen Sammelstellen für Altbatterien abgeben oder an PRD zur ordnungsgemäßen Entsorgung zurückschicken.
-
-  Achten Sie bei Verwendung von Kopfhörern auf eine angemessene und NICHT zu hohe Lautstärke, da anderenfalls Ihr Hörvermögen auf Dauer beeinträchtigt werden kann.
-
-  Die für das Ladegerät erforderliche Netzspannung beträgt 110-240 V bei 50/60 Hz Wechselstrom. Schließen Sie das Ladegerät niemals an Gleichstrom oder eine andere Stromquelle an.
-
-  Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für gebrauchte elektronische Produkte, über das die richtige Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung gemäß der bestehenden Gesetzgebung gewährleistet wird. Privathaushalte in den 27 Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen können ihre gebrauchten elektronischen Produkte an vorgesehenen Sammeleinrichtungen kostenfrei abgeben oder aber an den Händler zurückgeben, von dem sie es erworben haben.
-
-  Nicht gedacht als Notrufgerät oder alleinige Kommunikationshilfe.
-
-  Nicht gedacht zum Anschluss an bzw. zum Verbinden mit Nicht-Medizinprodukte(n).
-
-  Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Funkwellen abstrahlenden Geräten, da dabei Interferenzen auftreten können. Entfernen Sie sich wenn möglich von der Quelle der Interferenz.
-
-  Halterungs- und Befestigungssysteme dürfen nur von qualifiziertem Personal montiert werden. Fehlerhafte Montage kann zu Verletzungen des Benutzers führen.
-
-  Saltillo Corporation übernimmt keine Verantwortung bei einem Datenverlust aufgrund einer Reparatur oder eines Akkuwechsels. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Daten regelmäßig auf einem externen Speichermedium sichern.
-
-  Kabel und Gurte bergen eine Erstickungs- oder Strangulationsgefahr. Achten darauf dass keine Schlingen vorhanden sind.
-



Implantierbare Medizinprodukte

Halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem tragbaren Gerät wie dem NovaChat und einem implantierten Gerät wie Schrittmacher oder Kardioverter-Defibrillator, um potentielle Interferenzen mit dem NovaChat zu vermeiden.

Menschen, denen ein Gerät wie ein Schrittmacher oder Kardioverter-Defibrillator implantiert wurde,

- sollten **IMMER** einen Mindestabstand von mindestens 15 cm zwischen NovaChat-Gerät und dem implantierten Gerät einhalten, solange das NovaChat-Gerät eingeschaltet ist;
- sollten das NovaChat-Gerät nicht in einer Brusttasche oder am Gürtel in einem Abstand von weniger als 15 cm vom implantierten Gerät tragen, da das NovaChat-Gerät nach dem Einschalten – auch dann, wenn es nicht verwendet wird – Signale aussenden kann. Das NovaChat-Gerät sollte auf der dem implantierten Gerät **ABGEWANDTEN** Seite getragen werden;
- sollten das NovaChat-Gerät **SOFORT AUSSCHALTEN**, wenn die Gefahr einer Interferenz besteht.
- sollten alle Anweisungen des Herstellers des implantierten Geräts lesen und befolgen. Haben Sie Fragen zur Verwendung Ihres mobilen NovaChat-Geräts in Verbindung mit einem implantierten Gerät, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst des Herstellers des implantierten Geräts.

INHALTSVERZEICHNIS

Hinweise	2
Sicherheitshinweise.....	3
Willkommen beim NovaChat	6
Den NovaChat kennen lernen	7
Den Akku laden.....	8
Batteriekontrolle	9
Den NovaChat ein- und ausschalten	10
Den NovaChat ein- und ausschalten.....	10
Den NovaChat herunterfahren	10
Den NovaChat hochfahren.....	10
Der NovaChat-Verstärker	11
Den NovaChat-Verstärker ein- und ausschalten.....	12
Den NovaChat-Verstärker einschalten	12
Den NovaChat-Verstärker ausschalten	12
Den NovaChat-Verstärker mit dem Smartphone verbinden.....	12
Verstärker und Smartphone erneut verbinden.....	13
Die Lautstärke regeln	14
Tasten anschließen.....	14
Kopfhörer verwenden	14
Den Tischständer verwenden	15
Der Touchscreen-Bildschirm	16
Stylus verwenden	16
Reinigung.....	17
Desinfizieren des Geräts und/oder des Zubehörs.....	17
Hinweise zum Wiedereinsatz	18
Chat-Anwendung beenden (offenes System)	19
Der Android-Startbildschirm (offenes System).....	19
Chat-Anwendung starten (offenes System)	19
Technische Daten	20
Index.....	21

Willkommen beim NovaChat

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb einer NovaChat-Kommunikationshilfe!

Der NovaChat 5 verbindet die Haltbarkeit und Portabilität eines modernen Smartphones mit der Leistungsfähigkeit der *Chat*-Software von Saltillo und den Wortschatzprogrammen von PRD. Durch sein geringes Gewicht und die kompakten Abmessungen kann der NovaChat überall hin mitgenommen werden.

Der NovaChat verfügt sowohl über digitalisierte (natürliche) Sprache als auch synthetische Sprache (computergenerierte Sprache). Zur Beschleunigung der Kommunikationsgeschwindigkeit steht eine lernfähige Wortvorhersage zur Verfügung. Neben der direkten Ansteuerung über das Display bietet der NovaChat die Möglichkeit der Ansteuerung über 1 oder 2 Tasten im so genannten Scanningverfahren.

Der NovaChat wird komplett mit der PC-Software *Chat-Editor* geliefert, mit deren Hilfe Sie bequem alle Änderungen am Vokabular vornehmen können, um diese dann zu einem beliebigen Zeitpunkt in den NovaChat zu übertragen. Änderungen können jedoch auch direkt auf dem Gerät durchgeführt werden.

Das Übertragen von Vokabulardateien zwischen PC und NovaChat erfolgt bequem über das mitgelieferte USB-Sync-Kabel.


Zum Kennenlernen der Gerätesoftware *Chat* lesen Sie bitte ebenfalls das Software-Manual durch.

Um auch später noch darin nachschlagen zu können, bewahren Sie die Bedienungsanleitung bitte auf.

Den NovaChat kennen lernen



Zum Ein- und Ausschalten dient die Ein-/Aus-Taste oben links auf dem NovaChat. Zur Steuerung des Geräts verfügt der NovaChat 5 über 2 Tasten rechts im Display:

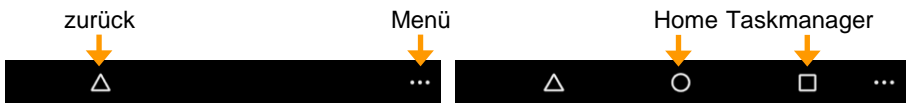

Ist der Kiosk-Modus auf dem NovaChat deaktiviert, werden zusätzlich noch die Tasten „Home“ und „Taskmanager“ angezeigt.

Die Taste „Menü“ öffnet das Hauptmenü der Anwendung „Chat“:



Die Taste „zurück“ schließt geöffnete Fenster, Menüs und Seiten.

Den Akku laden

Der NovaChat 5 verfügt über 2 eingebaute Akkus, einen im Smartphone und einen im Verstärker.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät zum Laden des NovaChat 5.

Das mitgelieferte Netzteil hat 2 Ladestecker.



Schließen Sie das mitgelieferte weiße USB-Kabel zum Laden des NovaChats an die Kupplung im Ladekabel des NovaChat-Netzteils an.

Zum Datenaustausch mit dem PC ziehen Sie das weiße USB-Kabel vom Ladekabel ab und verbinden es direkt mit Ihrem PC.

- Schließen Sie den weißen Stecker an die Micro-USB-Ladebuchse des Smartphones an (Abbildung Pfeil „1“).
- Schließen Sie den schwarzen Stecker an die Mini-USB-Ladebuchse des NovaChat-Verstärkers an (Abbildung Pfeil „2“).



Schalten Sie das Smartphone beim Laden durch kurzes Drücken der Ein-/Aus-Taste auf der Oberseite des Smartphones aus. Das Laden geschieht schneller, wenn das Smartphone dabei nicht benutzt wird.

Die rote LED neben der Ladebuchse des NovaChat-Verstärkers leuchtet während des Ladevorgangs. Ist der Akku des NovaChat-Verstärkers vollständig geladen, blinkt die LED.

Den Ladezustand des Smartphoneakkus und des Verstärkerakkus können Sie kontrollieren im Menü *Einstellungen - System - Batterie- und Ladezustand*.

Bei normaler Nutzung sollten Sie den NovaChat 5 jede Nacht aufladen.

Batteriekontrolle

Um die aktuelle Kapazität der Akkus zu kontrollieren:

- Drücken Sie die Taste MENÜ des Geräts:



- Wählen Sie das Menü „Einstellungen“.
- Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ das Menü „System“.
- Wählen Sie „Batterie- und Ladezustand“
- Kapazität und Ladezustand der beiden Akkus werden angezeigt:



Den NovaChat ein- und ausschalten

Zum Ein- und Ausschalten dient die Ein-/Aus-Taste auf der oberen Schmalseite des NovaChats.




Den NovaChat ein- und ausschalten

Um den NovaChat in der täglichen Benutzung ein- und auszuschalten, tippen Sie jeweils kurz auf die Ein-/Aus-Taste. Das Ein- bzw. Ausschalten erfolgt umgekehrt. Es ist nicht nötig, den NovaChat zwischen zwei Benutzungen komplett herunterzufahren. Um Energie zu sparen, kann die Beleuchtung des Bildschirms nach einer einstellbaren Zeit automatisch ausgeschaltet werden. Dies erfolgt im Menü *Einstellungen – System – Display / Energie – Bildschirm ausschalten*.

Den NovaChat herunterfahren

Wollen Sie den NovaChat einen längeren Zeitraum nicht mehr benutzen, können Sie ihn komplett herunterfahren.

- Drücken Sie dazu die Ein-/Aus-Taste für ca. 1 Sekunde.
- Wählen Sie im Menü die Option „Ausschalten“.
- Das Smartphone schaltet sich aus.

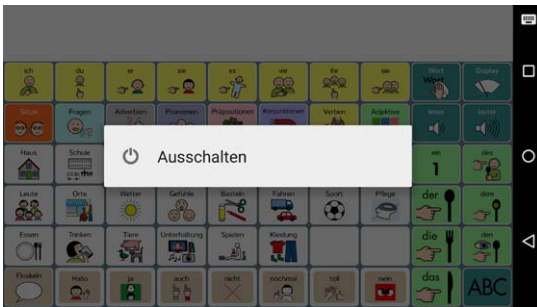

Wichtig: Schalten Sie auch den Verstärker aus, wenn Sie das Smartphone herunterfahren, da sich sonst der Akku des Verstärkers schnell entlädt (siehe S. 12).

Den NovaChat hochfahren

Ist der NovaChat komplett ausgeschaltet (heruntergefahren):

- Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, bis das Motorola-Logo auf dem Bildschirm erscheint.
- Das Smartphone bootet.
- Die NovaChat-Anwendung „Chat“ startet anschließend automatisch.



Der NovaChat-Verstärker


Der rückseitig angebrachte Verstärker hat eine eigene Energieversorgung und kommuniziert über den Bluetooth-Funkstandard mit dem Smartphone.

Standardmäßig kann der Verstärker eingeschaltet bleiben.

Sollte in speziellen Umgebungen (im Flugzeug, in bestimmten medizinischen Einrichtungen) die Verwendung von Bluetooth untersagt sein, schalten Sie den Offline-Modus ein:

1. Drücken Sie die Home-Taste. Der Android-Homescreen wird angezeigt.
2. Wählen Sie „Einstellungen“.
3. Wählen Sie „...Mehr“
4. Schieben Sie den virtuellen Schiebeschalter bei „Flugmodus“ nach rechts.

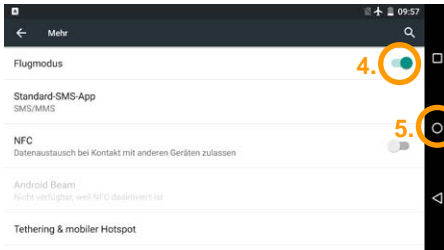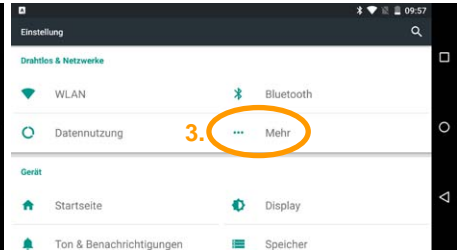

5. Drücken Sie die Home-Taste.
6. Drücken Sie das NovaChat-Symbol. Die Anwendung *Chat* wird gestartet.
7. Der aktivierte Flugmodus wird im Display angezeigt .

Um Bluetooth wieder einzuschalten, deaktivieren Sie den Flugmodus.

Den NovaChat-Verstärker ein- und ausschalten

Zum Ein- und Ausschalten des Verstärkers dient die kleine „I/O“-Taste auf der Rückseite des NovaChats. Nehmen Sie die Spitze eine Kugelschreibers oder eine aufgebogene Büroklammer zum Betätigen der Taste.



Den NovaChat-Verstärker einschalten

Drücken und halten Sie die Taste ca. 1 Sekunde. Die blaue LED beginnt zu blinken.

Den NovaChat-Verstärker ausschalten

Drücken und halten Sie die Taste, bis die blaue und die rote LED aufleuchten.

Bei ausgeschaltetem Verstärker oder im Offline-Modus erfolgt die Wiedergabe über die Lautsprecher des Smartphones.

Den NovaChat-Verstärker mit dem Smartphone verbinden

Um den Verstärker mit dem Smartphone zu koppeln und zu verbinden:

1. Stellen Sie sicher, dass der Verstärker eingeschaltet und geladen ist.
2. Öffnen Sie das Menü *Einstellungen – System – Bluetooth / Lautsprecher*. Das Smartphone beginnt nach dem Verstärker zu suchen.
3. Wurde der Verstärker gefunden, erscheint ein Eintrag „NOVA AMP“ im Display

NOVA AMP (00:07:80:53:3D:35)

4. Tippen Sie auf den Eintrag, um Smartphone und Verstärker zu verbinden. Das Smartphone zeigt eine erfolgreiche Verbindung durch das Wort „VERBUNDEN“ an.
5. Schließen Sie das Menü wieder.

Verstärker und Smartphone erneut verbinden

Sollte die Bluetooth-Verbindung zwischen Smartphone und Verstärker verloren sein:

1. Drücken und Halten Sie die Taste „zurück“ auf dem Smartphone:



2. Ein Fenster erscheint:

- „Wollen Sie die Anwendung beenden?“ (offenes System)
- „Wollen Sie die Anwendung neu starten?“ (geschlossenes System)

3. Drücken Sie die Taste „Ja“.

4. Offenes System: Starten Sie die Chat-Anwendung neu durch Tippen auf das Symbol auf dem Home-Screen:



Geschlossenes System: Die Chat-Anwendung wird neu gestartet.


5. Die Verbindung wird automatisch wieder hergestellt.

Die Lautstärke regeln

Sie können die Lautstärke direkt auf dem Gerät einstellen.


Drücken Sie den linken Teil der Lautstärkewippe, um die Lautstärke zu erhöhen.

Drücken Sie den rechten Teil der Lautstärkewippe, um die Lautstärke zu verringern.

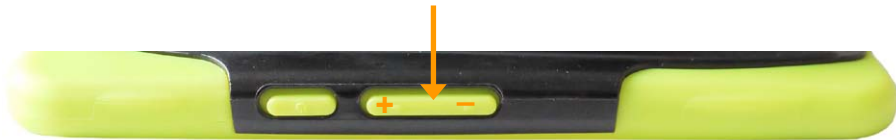

Sie können die Lautstärke auch über entsprechend belegte Tasten in Ihrem Vokabular regeln und die Sprachausgabe ausschalten. Dafür stehen die Funktionen „leiser“, „lauter“ und „Sprache ein/aus“ zur Verfügung.


Tasten anschließen

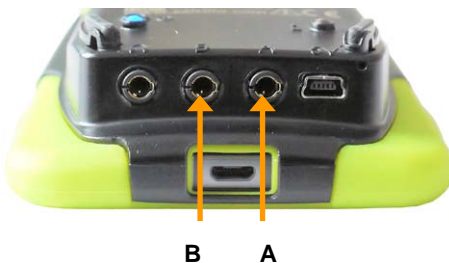

Wenn Sie mit einer externen Taste scannen, schließen Sie diese an die Buchse „A“ unten am Verstärker an.

Wenn Sie mit zwei externen Tasten scannen, schließen Sie diese an die Buchsen „A“ und „B“ unten am Verstärker an.

Kopfhörer verwenden

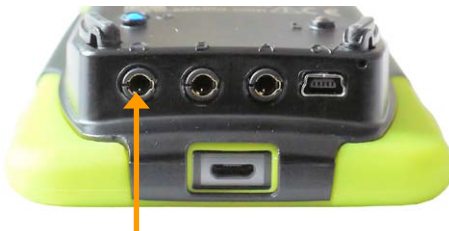

Wenn Sie auditives Scanning (Ansagescanning) verwenden, schließen Sie den Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse unten am Verstärker an.

Den Tischständer verwenden

Der NovaChat verfügt über einen eingebauten Aufstellbügel, der einen Betrieb des Geräts auf ebenen Oberflächen in einem Winkel von ca. 80° (Querformat) bzw. 30° (Hochformat) ermöglicht.

Zur Nutzung des Tischständers klappen Sie diesen auf. Legen Sie das Gerät dazu flach mit der Displayseite auf den Tisch. Achten Sie darauf, dass das Display des NovaChats keine Kratzer bekommt. Ziehen Sie den Bügel in der Gerätemitte aus seiner Arretierung.



Ziehen Sie den Bügel ca 80° nach oben, bis er hörbar in der oberen Arretierung einrastet. Drehen Sie das Gerät um.



Der Touchscreen-Bildschirm



Sicherheitshinweis: Im NovaChat ist ein Flüssigkristalldisplay (LCD, Liquid Crystal Display) eingebaut. Sollte das Display jemals zerbrechen und Sie in Kontakt mit den Flüssigkristallen kommen, spülen Sie die Kristalle unter fließendem Wasser ab und waschen Sie die betroffenen Hautstellen gründlich.



Sicherheitshinweis: Das Display besteht aus Glas, sollte das Display jemals zerbrechen, schützen Sie sich vor Glassplittern.



Hinweis: Benutzen Sie für Eingaben auf dem Touchscreen keine scharfen oder spitzen Gegenstände. Diese könnten die Oberfläche beschädigen. Obwohl Sie Eingaben mit den Fingern machen können, empfehlen wir zur Verwendung der Menüs auf dem NovaChat die Benutzung des mitgelieferten Stylus.

Stylus verwenden

Der NovaChat wird mit einem Bedienstift (Stylus) geliefert. Falls Sie den NovaChat nicht mit den Fingern bedienen wollen oder können, können Sie den Stift verwenden, um Eingaben vorzunehmen.



Der Stift verfügt über eine Öffnung an der Spitze, so dass sie ihn mit einem Band oder Lanyard am NovaChat befestigen können.

Reinigung

Zur Reinigung des NovaChat 5 wischen Sie ihn bitte mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch ab. Achten Sie darauf, dass kein Wasser an das Gerät gelangt.

Desinfizieren des Geräts und/oder des Zubehörs

Hinweis: Den hier gemachten Angaben zur Desinfizierung von Geräten und Zubehör ist stets zu folgen, wenn ein und dasselbe Gerät bzw. Zubehör von mehreren Patienten verwendet werden soll. In solch einem Fall ist es unerlässlich, das Hilfsmittel und das verwendete Zubehör effektiv zu desinfizieren, bevor es an einen anderen Patienten ausgehändigt wird.

1. Ziehen Sie Einmalhandschuhe an.
2. Demontieren Sie Zubehör wie Abdeckgitter.
3. Reinigen Sie Gerät und Zubehör
 - 3.1 Wischen Sie Gerät und Zubehör mit einem Desinfektionstuch (viruzid, bakterizid, pseudomonizid, tuberkulozid, fungizid) ab, z. B. Metrex CaviWipes. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers des Desinfektionstuchs für die Reinigung.
 - 3.2 Befeuchten Sie ein Wattestäbchen mit einem Glasreiniger und reinigen Sie alle Zwischenräume der Kommunikationshilfe. Benutzen Sie ggf. eine Bürste (z.B. eine Zahnbürste), um in Zwischenräumen und Spalten zu reinigen.
 - 3.3 Trocknen Sie das Gerät mit einem Fön oder wischen Sie es trocken.

Wichtig! Stellen Sie sicher, dass aller Schmutz vom Gerät und vom Zubehör entfernt wurde, bevor Sie das Equipment desinfizieren.

4. Desinfizieren Sie Gerät und Zubehör
 - 4.1 Wischen Sie Gerät und Zubehör mit einem neuen Desinfektionstuch (viruzid, bakterizid, pseudomonizid, tuberkulozid, fungizid) gründlich ab, z. B. Metrex CaviWipes. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers des Desinfektionstuchs für die Desinfizierung.
 - 4.2 Wischen Sie auch alle Ecken, Kanten und Spalten gründlich.
 - 4.3 Wischen Sie Gerät und Zubehör mindestens drei (3) Minuten lang ab.
 - 4.4 Lassen Sie Gerät und Zubehör trocken.
5. Reinigung des Touchscreens
 - 5.1 Sobald das Gerät trocken ist, reinigen Sie Display / Touchscreen mit für Displays und Computermonitore geeignetem Glasreiniger. Verwenden Sie keine essighaltigen Reiniger, da diese das Display verfärben könnten.
 - 5.2 Lassen Sie das Gerät trocken.


Hinweise zum Wiedereinsatz

Das Gerät ist für den Wiedereinsatz geeignet. Im Falle eines Wiedereinsatzes sind durch den Hersteller folgende Maßnahmen durchzuführen:


- Reinigung des Hilfsmittels
- Desinfektion des Hilfsmittels
- Funktionsprüfung
- Sicherheitstechnische Kontrolle
- Durchführen evtl. Soft- und Firmwareupdates
- Löschen des benutzerspezifischen Vokabulars und der benutzerspezifischen Lexika (Textbausteine, Aussprachelexikon, Wortvorhersagelexikon)
- Rücksetzen aller Einstellungen auf Standardwerte

Chat-Anwendung beenden (offenes System)

Ist der NovaChat 5 nicht als geschlossene Anlage konfiguriert und der Kiosk-Modus deaktiviert, können Sie die Chat-Anwendung beenden:

- Drücken und halten Sie die Taste „zurück“ auf dem Smartphone: . Ein Fenster erscheint: „Wollen Sie die Anwendung beenden?“ Drücken Sie die Taste „Ja“.

oder


- Drücken Sie die Taste „Home“ auf dem Smartphone: .

Der Android-Startbildschirm (offenes System)



Chat-Anwendung starten (offenes System)

Wurde die Chat-Anwendung beendet, können Sie sie jederzeit wieder starten durch Antippen des Programm-Symbols:

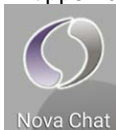

Um die bestmögliche Leistung zu erhalten, beenden Sie andere Apps, bevor Sie Chat starten.

Technische Daten

Bildschirm	5,7" Multitouch
Bildschirmauflösung	2560 x 1440 Bildpunkte
Abmessungen (BxHxT)	16 cm x 8,2 cm x 3 cm
Gewicht	966 g
Lautsprecher	1
Mikrofon	1
Prozessor	Snapdragon™ 808-Prozessor mit Hexa-Core-CPU
Arbeitsspeicher	3 GB
Interner Speicher	16 GB
Betriebssystem	Android 5.1.1
Anschlüsse Smartphone	1 x Micro-USB (Laden & Datenübertragung)
	1 x microSDHC-Karte
	WLAN IEEE 802.11 b/g IEEE 802.11 b/g/n
	Bluetooth Klasse 2
Anschlüsse Verstärker	1 x Mini-USB (Laden)
	2 x 3,5 mm Anschluss für externe Taste
	1 x 3,5 mm Anschluss für Kopfhörer
	Bluetooth 4.2
Akku Smartphone	Li-Polymer 3000 mAh
Akku Verstärker	Li-Ion 1200 mAh
Akkulaufzeit Smartphone	bis zu 8 h
Akkulaufzeit Verstärker	bis zu 8 h
integrierte Kamera	5 Megapixel (vorne), 21 Megapixel (hinten)
Ladegerät / Netzteil	5 V / 2,9 A

Index

A

Akku laden 8
Akkuskontrolle 9
Android-Startbildschirm 19

B

Batteriestatus 9

C

CE-Konformitätserklärung 2
Chat-Anwendung beenden 19
Chat-Anwendung starten 19
ChatTalker laden 8

D

Desinfizieren 17

H

Hinweise 2
Hinweise zum Wiedereinsatz 18

I

Implantierbare Medizinprodukte 4
Inhaltsverzeichnis 5

K

Kopfhörer verwenden 14

L

Ladezustandskontrolle 9
Lauter 14
Lautstärke regeln 14
Leiser 14

N

NovaChat ausschalten 10
NovaChat einschalten 10
NovaChat herunterfahren 10
NovaChat hochfahren 10
NovaChat-Verstärker 11
NovaChat-Verstärker ausschalten 12
NovaChat-Verstärker einschalten 12
NovaChat-Verstärker mit dem Tablet verbinden 12

R

Reinigung 17

S

Sicherheitshinweise 3
Stylus 16

T

Tasten anschließen 14
Technische Daten 20
Tischständer 15
Touchscreen-Bildschirm 16

U

Umgebungsbedingungen 2

V

Verbinden (NovaChat-Verstärker) 12
Verstärker und Tablet erneut verbinden 13

W

Wiedereinsatz, Hinweise zum 18



Prentke Romich GmbH

Goethestr. 31
D- 34119 Kassel
Tel. (0561) 78559-0
Fax (0561) 78559-29
E-Mail info@prentke-romich.de
Web www.prentke-romich.de