


# PRD-WÖRTER DES MONATS

## schnell – langsam

### METACOM-SYMBOLE

schnell

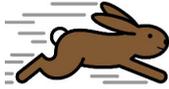

langsam



### QUASSELKISTE 45 2.0


schnell



QK45

2013.07

langsam

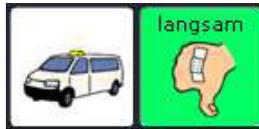

QK45

2013.07

### QUASSELKISTE 60 NEU

schnell



QK60

2013.07

langsam



QK60

2013.07

### WORTSTRATEGIE 84 NEU

schnell



WS84

2013.07

langsam



WS84

2013.07

### LOGOFOXX 50

schnell



LGF50

2013.07

langsam



LGF50

2013.07

### LOGOFOXX 60


schnell



LGF60

2013.07

langsam

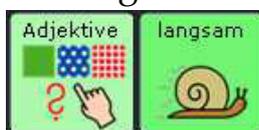

LGF60

2013.07

# PRD-WÖRTER DES MONATS

## *schnell – langsam*

### MIT ZUG ODER AUTOS SPIELEN

Beim gemeinsamen Spiel mit der Eisenbahn oder mit Autos kann der Talkerbenutzer immer wieder über das Tempo der Fahrzeuge entscheiden.

### IM ROLLI SCHIEBEN

Der Rollstuhlfahrer teilt seinem Assistenten mit, wie schnell oder langsam er geschoben werden möchte. Über mehrmaliges Äußern des jeweiligen Wortes kann er das Tempo schrittweise erhöhen oder drosseln.

### AUF DEM ROLLBRETT FAHREN

Auch wer sich auf dem Rollbrett schieben lässt, kann mit den Wörtern „schnell“ und „langsam“ Einfluss auf die Geschwindigkeit nehmen.

### IM SPIEL KOMMENTIEREN

Bei Spielen wie „Mensch ärgere Dich nicht“ oder „Tempo, kleine Schnecke!“ kann der Talkerbenutzer den Spielverlauf kommentieren: z.B. „du bist ja schnell“ oder „wie langsam“.

### IM ALLTAG BEOBACHTEN

Beobachten Sie gemeinsam im Alltag, wer oder was schnell und langsam ist. Wer läuft gerade schnell durch die Schule? Wer langsam? Welches Tier im Garten bewegt sich schnell? Welches langsam?

### „ICH BIN DIRIGENT“ (PRD-IDEE MÄRZ 2012)

Beim gemeinsamen Musizieren nimmt der Dirigent Einfluss auf das Tempo der Musik.

### „DER BEWEGUNGSDIRIGENT“ (PRD-IDEE SEPTEMBER 2008)

Bei dieser Aktivität bewegen sich die Mitspieler auf ganz unterschiedliche Weise – unter anderem schnell und langsam.

### „SPIEL AUF DEM AUTOTEPPICH“ (ENTDECKE DIE KRAFT DER SPRACHE MIT DEM MINSPEAK-ZIELVOKABULAR LB3 D)

Im gemeinsamen Spiel steuert der Talkerbenutzer die Aktionen, die auf dem Autoteppich geschehen. Hierbei lernt er, Zweiwort-Äußerungen zu verwenden, u.a. mit den Wörtern „schnell“ und „langsam“.

### „SPIELKOMMANDOS GEBEN“ (ENTDECKE DIE KRAFT DER SPRACHE MIT DEM MINSPEAK-ZIELVOKABULAR LB4 B)

Der Talkerbenutzer fordert die Mitspieler zu verschiedenen Handlungen auf. Diese können zum Beispiel „schnell“ oder „langsam“ durchgeführt werden.

# PRD-IDEEN DES MONATS

*schnell – langsam*

## Frühspurt

Zum Start in den Tag haben wir eine kleine Sport-Einheit vorbereitet. Alle Übungen können richtig schnell oder ganz langsam durchgeführt werden.

### DIESE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:

- ggf. Klettunkte

### DIESE PRD-PRODUKTE KÖNNEN EINGESETZT WERDEN:

- ggf. All-Turn-It-Spinner und Taste (z.B. JellyBean, JellyBeamer, Specs)
- 2 sprechende Tasten (z.B. BIGmack oder Step-by-Step)
- GoTalk9+, GoTalk20+ oder SuperTalker
- Minspeak-Anwendungsprogramme „Quasselkiste 45 / 60“ oder „Wortstrategie 84“
- Anwendungsprogramme „LoGoFoXX 50“ oder „LoGoFoXX 60“

### DAS GEHÖRT ZUR VORBEREITUNG:

- Beim Einsatz sprechender Tasten kennzeichnen Sie die Geräte mit den Symbolen und nehmen die entsprechenden Aussagen auf.
- Zur Benutzung des GoTalks bzw. SuperTalkers verwenden Sie das beigegefügte Deckblatt. Besprechen Sie das Gerät gemäß den Vorschlägen.
- Verwendet Ihr Talkerbenutzer ein Anwendungsprogramm, drucken Sie die Datei mit den Ikonensequenzen des entsprechenden Programms aus. Erstellen Sie einzelne Satzstreifen.
- Verwendet der Spielleiter 2 sprechende Tasten, einen SuperTalker oder ein Anwendungsprogramm, drucken Sie zusätzlich die Bildkarten aus und erstellen Sie daraus einzelne Kärtchen. Nutzen Sie die kleine Variante, wenn Sie die Bilder auf den All-Turn-It-Spinner kletten wollen. Nutzen Sie die große Variante, wenn Sie die Bildkarten ohne All-Turn-It-Spinner nutzen.

### JETZT KANN ES LOSGEHEN!

- Zunächst wird mittels GoTalk, All-Turn-It-Spinner oder durch Ziehen einer Bildkarte entschieden, welche Übung gemacht wird. Dann entscheidet der UK-Benutzer, ob die Übung schnell oder langsam durchgeführt werden soll.
- Alle Teilnehmer führen die Übung nun immer wieder in dem gewünschten Tempo aus, bis eine neue Übung ausgewählt wird.

### SO KANN ES WEITERGEHEN:

Vermitteln Sie den Einsatz der Wörter „schnell“ und „langsam“ auch in anderen Spiel- und Alltagssituationen. Weitere Ideen finden Sie in dieser Datei auf Seite 2.

Die „PRD-Ideen des Monats“ sind ein kostenloser Service der Prentke Romich GmbH.

Nutzung auf eigene Gefahr. Die Prentke Romich GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die aus der Befolgung der hier gemachten Angaben resultieren könnten.

Das Ein- bzw. Austragen in den Newsletter erfolgt unter [www.prentke-romich.de](http://www.prentke-romich.de).

#### Prentke Romich GmbH

Elektronische Kommunikationshilfen

Goethestr. 31

34119 Kassel



Tel. (0561) 78559-0


Fax (0561) 78559-29

E-Mail [info@prentke-romich.de](mailto:info@prentke-romich.de)

Web [www.prentke-romich.de](http://www.prentke-romich.de)




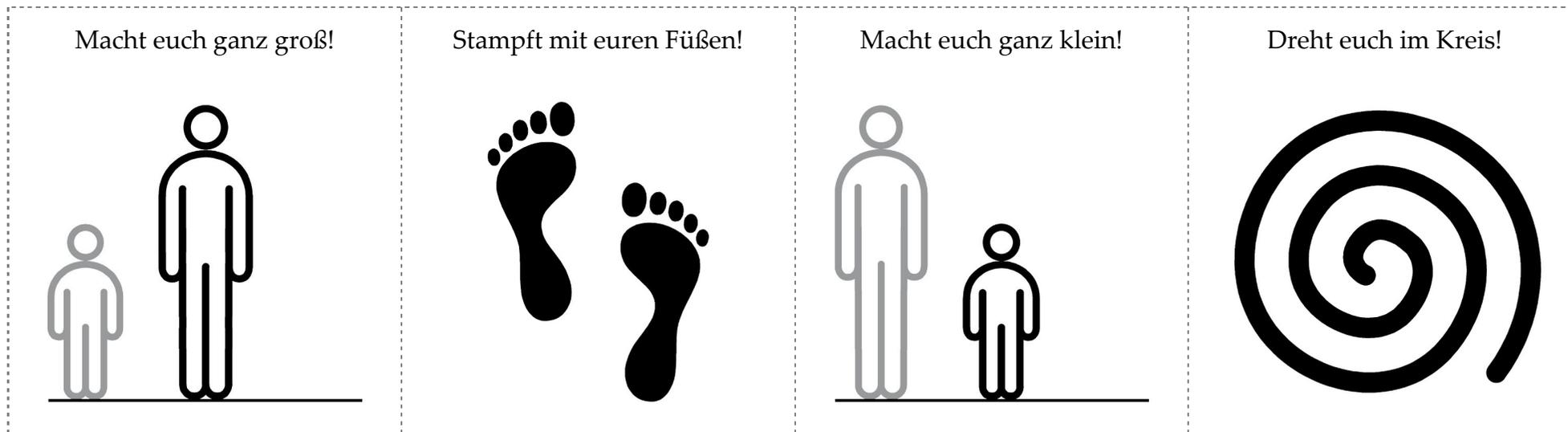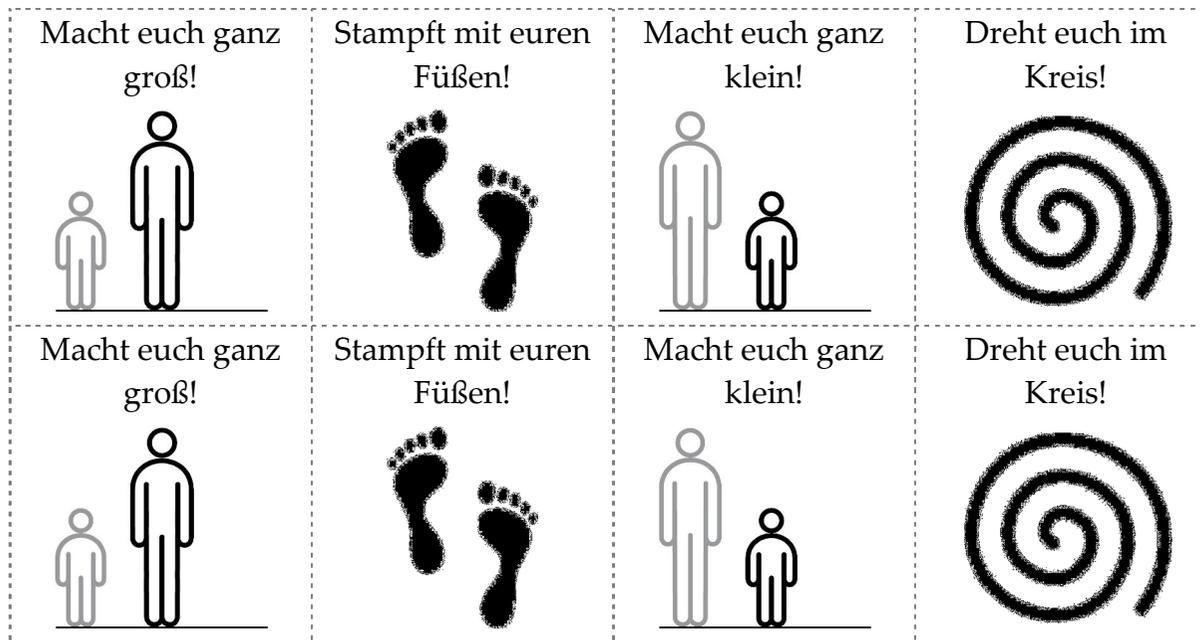

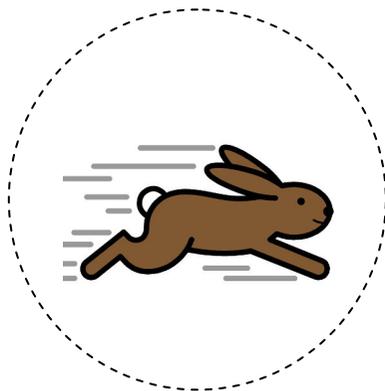

schnell

langsam

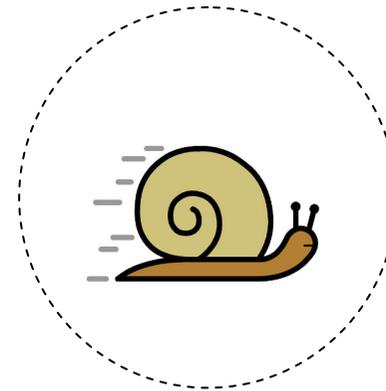



Feld 1: „schnell“

Feld 2: „langsam“

SuperTalker

© Prentke Romich GmbH 2013

Symbole: Annette Kitzinger

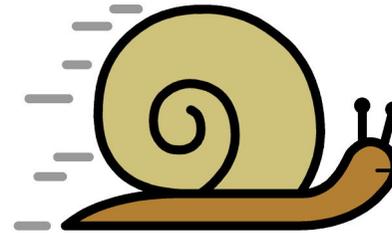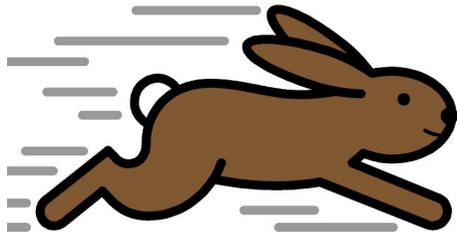


EBENE



Frühsport

TASTEN

2

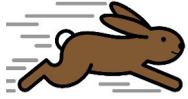


schnell



langsam



Stampft mit euren Füßen!

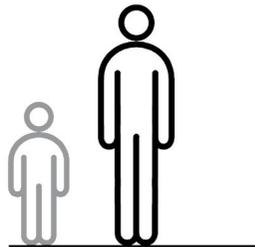

Macht euch ganz groß!

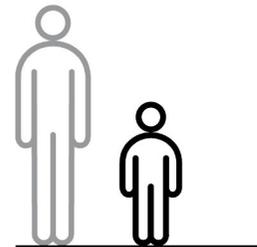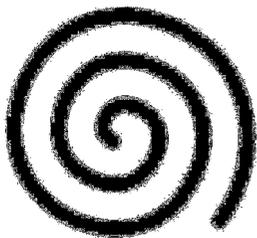

Dreht euch im Kreis!

Macht euch ganz klein!




schnell


langsam



Stampft mit euren Füßen!

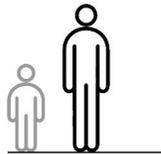


Macht euch ganz groß!

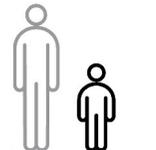


Dreht euch im Kreis!

Macht euch ganz klein!

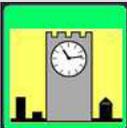jetzt   schnell  

QK45 2013.07

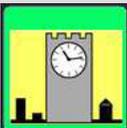jetzt   langsam  

QK45 2013.07

nochmal   schnell  

QK45 2013.07

nochmal   langsam  

QK45 2013.07

richtig   schnell  

QK45 2013.07

ganz   langsam  

QK45 2013.07

jetzt   jetzt schnell    schnell

QK60 2013.07

jetzt   jetzt langsam    langsam

QK60 2013.07

noch mal   noch mal schnell    schnell

QK60 2013.07

noch mal   noch mal langsam    langsam

QK60 2013.07

richtig    richtig schnell    schnell

QK60 2013.07

ganz   ganz langsam    langsam

QK60 2013.07

jetzt   schnell   

WS84 2013.07

jetzt   langsam   

WS84 2013.07

noch mal   schnell   

WS84 2013.07

noch mal   langsam   

WS84 2013.07

richtig    schnell   

WS84 2013.07

ganz   langsam   

WS84 2013.07

jetzt  schnell  LGF50 2013.07

jetzt  langsam  LGF50 2013.07

noch mal  schnell  LGF50 2013.07

noch mal  langsam  LGF50 2013.07

richtig  schnell  LGF50 2013.07

ganz  langsam  LGF50 2013.07

jetzt   schnell  

LGF60 2013.07

jetzt   langsam  

LGF60 2013.07

noch mal   schnell  

LGF60 2013.07

noch mal   langsam  

LGF60 2013.07

richtig   schnell  

LGF60 2013.07

ganz   langsam  

LGF60 2013.07