

PRD-IDEEN DES MONATS

rot – gelb – grün – blau

Uno! Eins!

Beim klassischen Kartenspiel UNO (= „Eins“) können ganz nebenbei die Farben und andere Wörter des Zielvokabulars vermittelt werden.

DIESE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:

- Uno-Kartenspiel

DIESE PRD-PRODUKTE KÖNNEN EINGESETZT WERDEN:

- MINSPEAK®-Anwendungsprogramme Quasselkiste 45/60 oder Wortstrategie 84
- Anwendungsprogramme LoGoFoXX 50 oder LoGoFoXX 60
- SuperTalker, GoTalk9+ oder GoTalk20+
- 1-2 sprechende Tasten (z.B. BIGmack oder Step-by-Step)

DAS GEHÖRT ZUR VORBEREITUNG:

- Verwendet Ihr Talkerbenutzer ein Anwendungsprogramm, drucken Sie die Datei mit den Sequenzen des entsprechenden Programms aus.
- Zur Benutzung des SuperTalkers und GoTalks verwenden Sie das beigegefügte Deckblatt. Besprechen Sie das Gerät gemäß den Vorschlägen.
- Beim Einsatz sprechender Tasten kennzeichnen Sie die Geräte mit den Symbolen und nehmen die entsprechenden Aussagen auf.

JETZT KANN ES LOSGEHEN!

- Die Spielregeln des Kartenspiels entnehmen Sie der Originalbeschreibung
- Mit Hilfe der Wortkarten kann der Benutzer den Spielverlauf kommentieren:
 - Welche Farbe /Zahl wird zum Ablegen benötigt („rot“ / „gelb“ / „1“ / „2“ etc.)?
 - Ist Ablegen möglich oder nicht („ich kann / ich kann nicht“ / „cool“, „Mist“)?
 - Muss eine Strafkarte gezogen werden („ich muss nehmen“)?
 - Ist nur noch eine Karte auf der Hand, muss dieses den Mitspielern durch „Eins!“ (= UNO) signalisiert werden.
- Die Aktionskarten machen das Kartenspiel erst so richtig lustig!
 - ZIEH ZWEI KARTE = „zwei nehmen“ / „nimm zwei“ etc.
 - ZIEH VIER FARBWAHLKARTE = „vier nehmen“
 - RETOUR KARTE = „jetzt rechts“ / „jetzt links“
 - AUSSETZEN KARTE = „warten“
 - FARBWAHLKARTE = „Farbe sagen“

SO KANN ES WEITERGEHEN:

Vermitteln Sie den Einsatz der Wörter „rot“, „gelb“, „grün“ und „blau“ auch in anderen Spiel- und Alltagssituationen. Weitere Ideen finden Sie in der Datei „Zielwörter und Kurzideen“.

Die „PRD-Ideen des Monats“ sind ein kostenloser Service der Prentke Romich GmbH. Nutzung auf eigene Gefahr. Die Prentke Romich GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die aus der Befolgung der hier gemachten Angaben resultieren könnten. Das Ein- bzw. Austragen in den Newsletter erfolgt unter www.prentke-romich.de.

Prentke Romich GmbH

Hilfsmittel für Unterstützte Kommunikation
 Goethestr. 31
 34119 Kassel
 Tel. (0561) 78559-0
 Fax (0561) 78559-29
 E-Mail info@prentke-romich.de
 Web www.prentke-romich.de

