

PRD-IDEEN DES MONATS

Warst du das?

Im Minfo 2-2011 haben wir Ihnen vorgestellt, wie Leseprojekte genutzt werden können, um Wörter des Zielvokabulars zu vermitteln und um darüber hinaus die Erzählfähigkeiten von UK-Benutzern zu erweitern. Dieses Mal stellen wir Ihnen das Buch „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ von Werner Holzwarth und Wolf Erlbruch vor.

DIESE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:

- „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ von Werner Holzwarth und Wolf Erlbruch (Peter Hammer Verlag)

DIESE PRD-PRODUKTE KÖNNEN EINGESETZT WERDEN:

- 1 bis 2 sprechende Tasten (z.B. BIGmacks oder Step-by-Steps)
- GoTalk9+, GoTalk20+ oder SuperTalker
- LightTalker mit „Quasselkiste 32“
- SmallTalker, XL-Talker oder EcoTalker mit „Quasselkiste 45“
- SmallTalker, XL-Talker oder EcoTalker mit „Quasselkiste 60“
- SmallTalker, XL-Talker oder EcoTalker mit „Wortstrategie 84“

DAS GEHÖRT ZUR VORBEREITUNG:

- Beim Einsatz sprechender Tasten kennzeichnen Sie die Geräte mit den Symbolen und nehmen die entsprechenden Aussagen auf.
- Zur Benutzung des GoTalks bzw. SuperTalkers verwenden Sie das beigegefügte Deckblatt. Besprechen Sie das Gerät gemäß den Vorschlägen.
- Verwendet Ihr Talkerbenutzer ein Anwendungsprogramm, drucken Sie die Datei mit den Ikonensequenzen des entsprechenden Programms aus. Erstellen Sie daraus einzelne Wortkarten und Satzstreifen.
- Reduzieren Sie ggf. die Anforderung, indem Sie Ihrem Talkerbenutzer zunächst eine geringere Anzahl an Wortkarten bzw. Satzstreifen anbieten.
- Drucken Sie die im Hinblick auf das Zielvokabular umformulierte Geschichte „Der kleine Maulwurf will wissen, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ aus. Schneiden Sie die einzelnen Textblöcke aus und kleben Sie sie jeweils unter den entsprechenden Originaltext im Buch.

JETZT KANN ES LOSGEHEN!

- Das Adaptieren der Geschichte haben wir bereits für Sie übernommen. Sie können also sofort mit dem Lesen der Geschichte beginnen.
- Entscheiden Sie, ob Sie mit der Gruppe zunächst den Originaltext lesen oder sofort mit der adaptierten Version beginnen wollen.
- Sobald Sie die adaptierte Version lesen, beteiligen Sie die Gruppe am Lesen, indem Sie gemeinsam über die einzelnen Abschnitte der Geschichte sprechen.
- Hierfür haben wir Ihnen Zielwörter als Ikonenkarten zusammengestellt, die sich besonders gut zum Sprechen über die Geschichte eignen.
- Darüber hinaus können Sie die Gruppe am Lesen beteiligen, indem verschiedene Personen einzelne Passagen mitlesen. Hierfür können die einfachen Hilfen wie BIGmack, Step-by-Step oder GoTalk sowie die Satzstreifen für die Anwendungsprogramme zum Einsatz kommen.

PRD-IDEEN DES MONATS

SO KANN ES WEITERGEHEN:

Um unsere Talkerbenutzer effektiv in ihrer Kommunikationsentwicklung zu unterstützen, haben wir für alle Minspeak-Anwendungsprogramme ein Zielvokabular entwickelt. Es besteht aus ca. 400 Wörtern, die sich flexibel und spontan in unterschiedlichen Situationen einsetzen lassen. Das Zielvokabularposter ist im Lieferumfang unserer Talker enthalten und kann auf unserer Homepage im Bereich Download heruntergeladen werden.

Darüber hinaus haben wir 12 Wortschatzmodule entwickelt, in denen 150 Wörter des Zielvokabulars wiederzufinden sind, um das Erlernen dieser Wörter zu erleichtern. Hiermit ist es möglich, über einen bestimmten Zeitraum eine Kommunikationsfunktion in den Fokus zu rücken:

KOMMUNIKATIONSFUNKTIONEN


1. Erstes Steuern einer Interaktion
2. Sich selbst, andere Personen und Besitzverhältnisse bezeichnen
3. Widersprechen und Protest ausdrücken
4. Zeitliche Aspekte einer Aktivität steuern
5. Um eine Handlung bitten oder eine Handlung steuern
6. Eine Handlung beschreiben oder kommentieren
7. Gegenstände bemerken und darum bitten
8. Positionen bezeichnen oder bestimmen
9. Um eine Information bitten
10. Befindlichkeiten oder Gefühle ausdrücken
11. Spezifische Tätigkeiten bezeichnen oder steuern
12. Erweiterte Zeitkonzepte ausdrücken

WORTVORSCHLÄGE

noch mal, fertig, mehr, genug, anders, weg, da, halt, helfen, allein, was, das, machen
 ich, bin, mein, du, bist, dein, er, sie, wir, eigener Name, Name 1, Name 2, Mama, Papa, Bruder, Schwester, Oma, Opa, Freund, Lehrer, für
 nicht, anders, falsch, kein, doch, Quatsch
 langsam, schnell, jetzt, dann, warten, machen
 kommen, gehen, geben, machen, finden, zeigen, sehen, brauchen, sagen, und, oder, zusammen, allein, mit
 gut, schlecht, heiß, kalt, groß, klein, nass, trocken, schwer, leicht, neu, alt, schnell, langsam, voll, leer, falsch, richtig, toll, doof, laut, leise, schmutzig, sauber, lang, kurz, viel, wenig, kaputt, und
 bitte, haben, möchten, auch, mehr, alle, etwas, ein, der/die/das
 an, aus, auf, zu, oben, unten, weg, da, hinter, vor, bei, in, über, unter, draußen
 fragen, wer, wann, wo, warum, wie, was, wie viel
 bin, bist, ist, sind, haben, Angst, Spaß, Schmerz, Hunger, Durst, traurig, glücklich, gut, schlecht, müde, langweilig, ärgern, freuen, lecker, eklig
 erzählen, arbeiten, essen, fahren, hören, kaufen, kochen, lesen, schreiben, malen, schlafen, schwimmen, spielen, trinken, sitzen, stehen, gehen, tragen, können, müssen, und, oder
 heute, gestern, morgen, früh, spät, Vormittag, Nachmittag, Abend, Nacht, war

Das gemeinsame Lesen des Buches „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ eignet sich besonders gut, um die Kommunikationsfunktion „Widersprechen und Protest ausdrücken“ zu vermitteln. Wiederholen Sie in möglichst vielen verschiedenen Alltagssituationen die Wörter des Wortschatzmoduls 3, damit Ihr Talkerbenutzer erleben kann, wie er widersprechen oder protestieren kann, um dadurch das Verhalten anderer zu beeinflussen. Bauen Sie in den Alltag bewusst kleine Ungereimtheiten ein, um die Zielwörter nutzen zu können: beim Kochen durch eine falsche Zutat, beim Spielen durch eine veränderte Regel oder bei Rollenspielen...

PRD-IDEEN DES MONATS

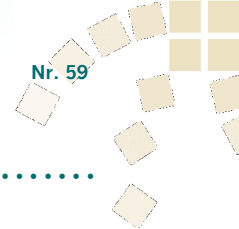

Die „PRD-Ideen des Monats“ sind ein kostenloser Service der Prentke Romich GmbH. METACOM Symbole © Annette Kitzinger

Nutzung auf eigene Gefahr. Die Prentke Romich GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die aus der Befolgung der hier gemachten Angaben resultieren könnten.

Das Ein- bzw. Austragen in den Newsletter erfolgt unter www.prentke-romich.de.

Elektronische Kommunikationshilfen

Prentke Romich GmbH

34119 Kassel

Tel. (0561) 78559-0

Fax (0561) 78559-29

E-Mail info@prentke-romich.de

Web www.prentke-romich.de

Der kleine Maulwurf will wissen, wer ihm auf den Kopf gemacht hat

Der kleine Maulwurf möchte wissen, ob die Sonne schon da ist.
Also kommt er nach oben und guckt raus. Doch was ist das???

(Es ist braun, lang und sieht aus wie eine Wurst.
Und wie doof: es fällt auf seinen Kopf!)

„Das ist gemein! Wie doof! Echt eklig!“,
ruft der kleine Maulwurf.

„Wer hat mir auf den Kopf gemacht?“.
(Aber es ist keiner mehr zu sehen.)

„Warst du das?“, fragt er die Taube.

„Ich? Quatsch! Ich mache doch so!“, sagt sie.
(Es ist weiß und nass.)

„Warst du das?“, fragt er das Pferd.

„Ich? Quatsch! Ich mache doch so!“, sagt es.
(Es ist groß und braun.)

„Warst du das?“, fragt er den Hasen.

„Ich? Quatsch! Ich mache doch so!“, sagt er.
(Es ist klein und fällt schnell.)

„Warst du das?“, fragt er die Ziege.

„Ich? Quatsch! Ich mache doch so!“, sagt sie.
(Es sieht fast aus wie Bonbons.)

„Warst du das?“, fragt er die Kuh.

„Ich? Quatsch! Ich mache doch so!“, sagt sie.

(Es ist braungrün, nass und sehr groß!)

„Warst du das?“, fragt er das Schwein.

„Ich? Quatsch! Ich mache doch so!“, sagt es.

(Es ist braun und riecht echt schlecht.)

„Wart ihr das?“, will er wieder fragen, aber dann sieht er:
es sind nur zwei Fliegen. Der Maulwurf denkt nach.

Vielleicht können sie mir helfen. Er fragt sie ganz schnell:

„Wer hat mir auf den Kopf gemacht?“

„Warte mal! Nichts machen!“, sagen die Fliegen.

Und dann: „Wir wissen es: es war ein Hund!“


Jetzt weiß der kleine Maulwurf,
wer ihm auf den Kopf gemacht hat:

Hans-Heinerich,
der Metzgershund!


Der Maulwurf läuft schnell auf das Hundehaus und lässt
ein kleines schwarzes Würstchen auf den Hundekopf fallen.

Jetzt ist er wieder glücklich und geht nach unten in sein Haus.

Tastensymbol für eine sprechende Taste

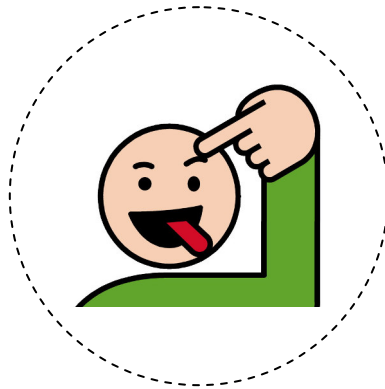

Ich?
So ein Quatsch!
Ich mache doch ganz
anders!
Ich mache so.

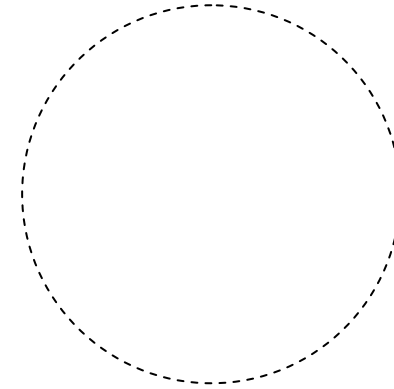


Tastensymbole für zwei sprechende Tasten



Warst du das?

Ich? Quatsch!
Ich mach doch so!

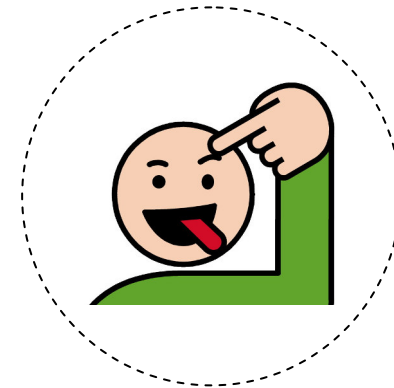

Feld 1: „Ich?“

Feld 2: „So ein Quatsch!“

Feld 3: „Ich mache doch ganz anders!“





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
Feld 4: „Ich mache so.“


Feld 5: -

Feld 6: -

Feld 7: -

Feld 8: -

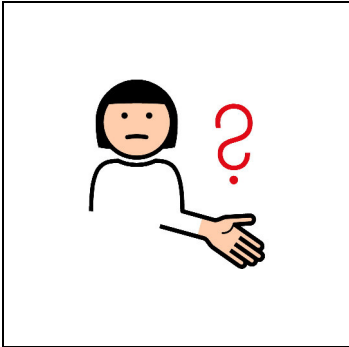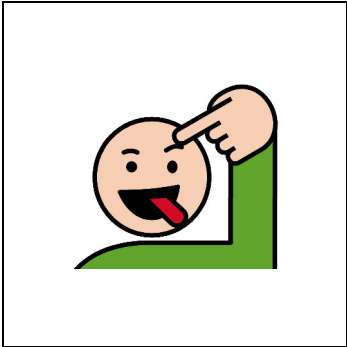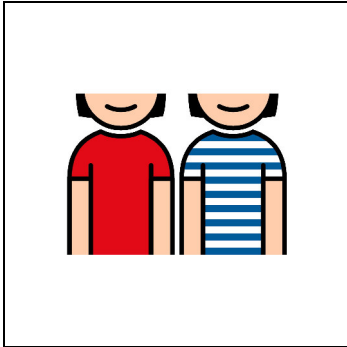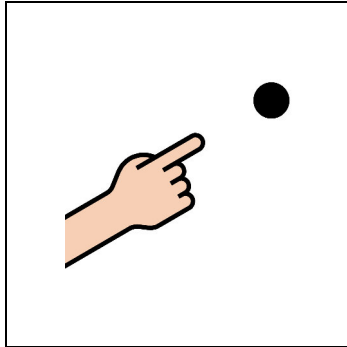SuperTalker		© Prentke Romich GmbH 2012		Symbole: Annette Kitzinger	
					
					
EBENE 		Warst du das?		TASTEN 	

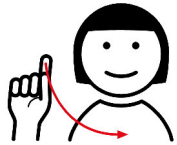


noch mal


fertig



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

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

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

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

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


Ich?

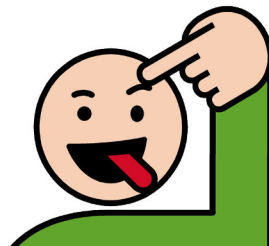

So ein Quatsch!

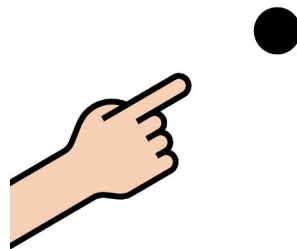

Ich mache doch so!

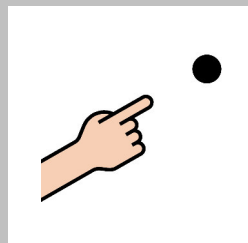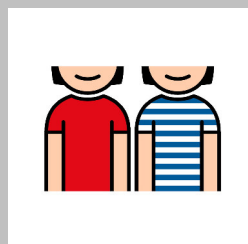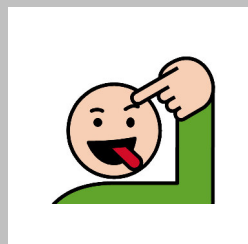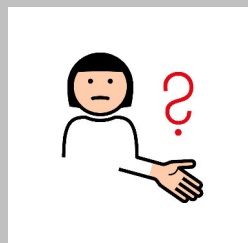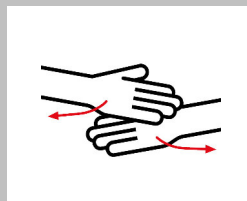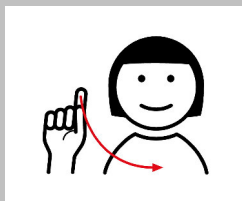

noch mal


fertig

Ich?

So ein Quatsch!


Ich mache doch ganz anders!

Ich mache so.

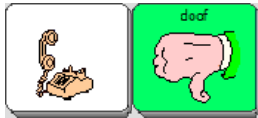ich  QK32 2012.04	du  QK32 2012.04	fragen  QK32 2012.04	machen  QK32 2012.04
sagen  QK32 2012.04	Quatsch  QK32 2012.04	doof  QK32 2012.04	eklig  QK32 2012.04
anders  QK32 2012.04	nicht  QK32 2012.04	so  QK32 2012.04	auf  QK32 2012.04
das  QK32 2012.04	wer  QK32 2012.04	wie  QK32 2012.04	Kopf  QK32 2012.04

wer   machen   das  

QK32 2012.04

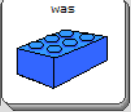wer   machen   so   was  

QK32 2012.04

ich   Quatsch  

QK32 2012.04

ich   nicht  

QK32 2012.04

ich   machen   anders  

QK32 2012.04

ich   machen   so  

QK32 2012.04

ich   QK45 2012.04	du   QK45 2012.04	fragen   QK45 2012.04	machen   QK45 2012.04
sagen   QK45 2012.04	Quatsch   QK45 2012.04	doof   QK45 2012.04	eklig   QK45 2012.04
anders   QK45 2012.04	nicht   QK45 2012.04	so   QK45 2012.04	auf   QK45 2012.04
doch   QK45 2012.04	das   QK45 2012.04	wer   QK45 2012.04	wie   QK45 2012.04
Kopf   QK45 2012.04			

wer   macht    das  

QK45 2012.04

wer   macht    so   was  

QK45 2012.04

ich   Quatsch  






QK45 2012.04

ich mache   anders  

QK45 2012.04

ich mache   doch   nicht   so  

QK45 2012.04

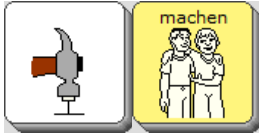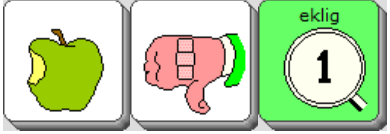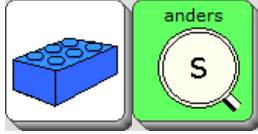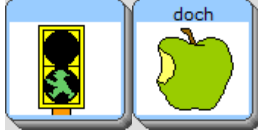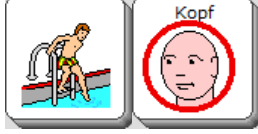ich  QK60 2012.04	du  QK60 2012.04	war  QK60 2012.04	fragen  QK60 2012.04
machen  QK60 2012.04	sagen  QK60 2012.04	Quatsch  QK60 2012.04	doof  QK60 2012.04
eklig  QK60 2012.04	gemein  QK60 2012.04	anders  QK60 2012.04	nicht  QK60 2012.04
so  QK60 2012.04	auf  QK60 2012.04	doch  QK60 2012.04	das  QK60 2012.04
wer  QK60 2012.04	wie  QK60 2012.04	Kopf  QK60 2012.04	

warst



du



das



QK60 2012.04

hast



du



das



gemacht



QK60 2012.04

wer



war



das



QK60 2012.04

wer




hat



das



gemacht

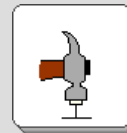

QK60 2012.04

ich



Quatsch



QK60 2012.04

ich mache



doch



so



QK60 2012.04

ich war



das



nicht



QK60 2012.04

ich mache



doch



nicht



so



QK60 2012.04

ich mache



anders



QK60 2012.04

ich habe



das







nicht



gemacht



QK60 2012.04

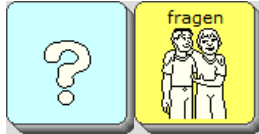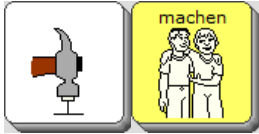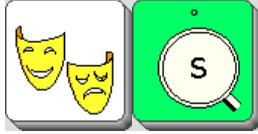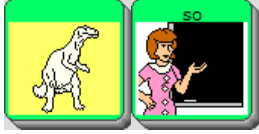ich  WS84 2012.04	du  WS84 2012.04	war  WS84 2012.04	fragen  WS84 2012.04
machen  WS84 2012.04	sagen  WS84 2012.04	Quatsch  WS84 2012.04	doof  WS84 2012.04
eklig  WS84 2012.04	gemein  WS84 2012.04	anders  WS84 2012.04	nicht  WS84 2012.04
so  WS84 2012.04	auf  WS84 2012.04	doch  WS84 2012.04	das  WS84 2012.04
wer  WS84 2012.04	wie  WS84 2012.04	Kopf  WS84 2012.04	

warst du



WS84 2012.04

hast du



WS84 2012.04

wer



WS84 2012.04

wer



WS84 2012.04

ich



WS84 2012.04

ich mache



WS84 2012.04

ich war



das




nicht



WS84 2012.04

ich mache

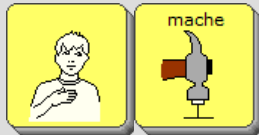

doch



nicht




so



WS84 2012.04

ich mache

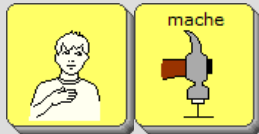

anders



WS84 2012.04

ich habe



das



nicht





gemacht




WS84 2012.04




Der Benutzer widerspricht anderen Personen und steuert deren Verhalten durch Protest.

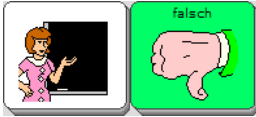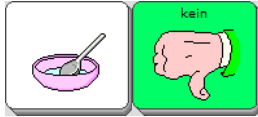nicht  QK32 Modul 3	anders  QK32 Modul 3	falsch  QK32 Modul 3	kein  QK32 Modul 3
Quatsch  QK32 Modul 3			


Der Benutzer widerspricht anderen Personen und steuert deren Verhalten durch Protest.

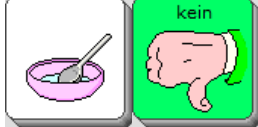nicht  QK45 Modul 3	anders  QK45 Modul 3	falsch  QK45 Modul 3	kein  QK45 Modul 3
doch  QK45 Modul 3	Quatsch  QK45 Modul 3		

Der Benutzer widerspricht anderen Personen und steuert deren Verhalten durch Protest.

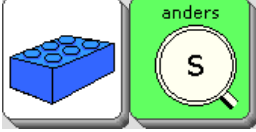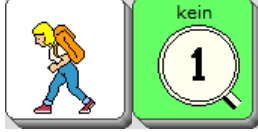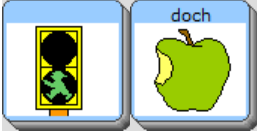nicht  QK60 Modul 3	anders  QK60 Modul 3	falsch  QK60 Modul 3	kein  QK60 Modul 3
doch  QK60 Modul 3	Quatsch  QK60 Modul 3		

Der Benutzer widerspricht anderen Personen und steuert deren Verhalten durch Protest.

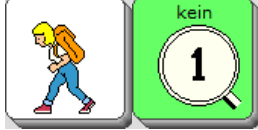nicht  WS84 Modul 3	anders  WS84 Modul 3	falsch  WS84 Modul 3	kein  WS84 Modul 3
doch  WS84 Modul 3	Quatsch  WS84 Modul 3		