

PRD-IDEEN DES MONATS

Das ist nicht genug!

Im Minfo 2-2011 haben wir Ihnen vorgestellt, wie Leseprojekte genutzt werden können, um Wörter des Zielvokabulars zu vermitteln und um darüber hinaus die Erzählfähigkeiten von UK-Benutzern zu erweitern. Dieses Mal haben wir für Sie das bekannte Kinderbuch „Die kleine Raupe Nimmersatt“ von Eric Carle adaptiert.

DIESE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:

- „Die kleine Raupe Nimmersatt“ von Eric Carle (Gerstenberg Verlag)

DIESE PRD-PRODUKTE KÖNNEN EINGESETZT WERDEN:

- 1 bis 2 sprechende Tasten (z.B. BIGmack oder Step-by-Step)
- GoTalk9+, GoTalk20+ oder SuperTalker
- Minspeak-Anwendungsprogramm „Quasselkiste 32“
- Minspeak-Anwendungsprogramm „Quasselkiste 45“
- Minspeak-Anwendungsprogramm „Quasselkiste 60“
- Minspeak-Anwendungsprogramm „Wortstrategie 84“

DAS GEHÖRT ZUR VORBEREITUNG:

- Beim Einsatz sprechender Tasten kennzeichnen Sie die Geräte mit den Symbolen und nehmen die entsprechenden Aussagen auf. Bei der Verwendung einer Taste mit den Wochentagen erfolgt die Aufnahme schrittweise.
- Zur Benutzung des GoTalks bzw. SuperTalkers verwenden Sie das beigegefügte Deckblatt. Besprechen Sie das Gerät gemäß den Vorschlägen.
- Verwendet Ihr Talkerbenutzer ein Anwendungsprogramm, drucken Sie die Datei mit den Ikonensequenzen des entsprechenden Programms aus. Erstellen Sie daraus einzelne Wortkarten und Satzstreifen.
- Reduzieren Sie ggf. die Anforderung, indem Sie Ihrem Talkerbenutzer zunächst eine geringere Anzahl an Wortkarten bzw. Satzstreifen anbieten.
- Drucken Sie die im Hinblick auf das Zielvokabular umformulierte Geschichte „Das ist nicht genug“ aus. Schneiden Sie die einzelnen Textblöcke aus und kleben Sie sie jeweils unter den entsprechenden Originaltext im Buch.

JETZT KANN ES LOSGEHEN!

- Das Adaptieren der Geschichte haben wir bereits für Sie übernommen. Sie können also sofort mit dem Lesen der Geschichte beginnen.
- Entscheiden Sie, ob Sie mit der Gruppe zunächst den Originaltext lesen oder sofort mit der adaptierten Version beginnen wollen.
- Sobald Sie die adaptierte Version lesen, beteiligen Sie die Gruppe am Lesen, indem Sie gemeinsam über die einzelnen Abschnitte der Geschichte sprechen.
- Hierfür haben wir Ihnen Zielwörter als Ikonenkarten zusammengestellt, die sich besonders gut zum Sprechen über die Geschichte eignen.
- Darüber hinaus können Sie die Gruppe am Lesen beteiligen, indem verschiedene Personen einzelne Passagen mitlesen oder kommentieren. Hierfür können die einfachen Hilfen wie BIGmack, Step-by-Step, SuperTalker oder GoTalk sowie die Satzstreifen für die Anwendungsprogramme zum Einsatz kommen.

PRD-IDEEN DES MONATS

SO KANN ES WEITERGEHEN:

Um unsere Talkerbenutzer effektiv in ihrer Kommunikationsentwicklung zu unterstützen, haben wir für alle Minspeak-Anwendungsprogramme ein Zielvokabular entwickelt. Es besteht aus ca. 400 Wörtern, die sich flexibel und spontan in unterschiedlichen Situationen einsetzen lassen. Das Zielvokabularposter ist im Lieferumfang unserer Talker enthalten und kann auf unserer Homepage im Bereich Download heruntergeladen werden.

Darüber hinaus haben wir 12 Wortschatzmodule entwickelt, in denen 150 Wörter des Zielvokabulars wiederzufinden sind, um das Erlernen dieser Wörter zu erleichtern. Hiermit ist es möglich, über einen bestimmten Zeitraum eine Kommunikationsfunktion in den Fokus zu rücken:

KOMMUNIKATIONSFUNKTIONEN

1. Erstes Steuern einer Interaktion
2. Sich selbst, andere Personen und Besitzverhältnisse bezeichnen
3. Widersprechen und Protest ausdrücken
4. Zeitliche Aspekte einer Aktivität steuern
5. Um eine Handlung bitten oder eine Handlung steuern
6. Eine Handlung beschreiben oder kommentieren
7. Gegenstände bemerken und darum bitten
8. Positionen bezeichnen oder bestimmen
9. Um eine Information bitten
10. Befindlichkeiten oder Gefühle ausdrücken
11. Spezifische Tätigkeiten bezeichnen oder steuern
12. Erweiterte Zeitkonzepte ausdrücken

WORTVORSCHLÄGE

noch mal, fertig, mehr, genug, anders, weg, da, halt, helfen, allein, was, das, machen

ich, bin, mein, du, bist, dein, er, sie, wir, eigener Name, Name 1, Name 2, Mama, Papa, Bruder, Schwester, Oma, Opa, Freund, Lehrer, für

nicht, anders, falsch, kein, doch, Quatsch

langsam, schnell, jetzt, dann, warten, machen

kommen, gehen, geben, machen, finden, zeigen, sehen, brauchen, sagen, und, oder, zusammen, allein, mit

gut, schlecht, heiß, kalt, groß, klein, nass, trocken, schwer, leicht, neu, alt, schnell, langsam, voll, leer, falsch, richtig, toll, doof, laut, leise, schmutzig, sauber, lang, kurz, viel, wenig, kaputt, und

bitte, haben, möchten, auch, mehr, alle, etwas, ein, der/die/das

an, aus, auf, zu, oben, unten, weg, da, hinter, vor, bei, in, über, unter, draußen

fragen, wer, wann, wo, warum, wie, was, wie viel

bin, bist, ist, sind, haben, Angst, Spaß, Schmerz, Hunger, Durst, traurig, glücklich, gut, schlecht, müde, langweilig, ärgern, freuen, lecker, eklig

erzählen, arbeiten, essen, fahren, hören, kaufen, kochen, lesen, schreiben, malen, schlafen, schwimmen, spielen, trinken, sitzen, stehen, gehen, tragen, können, müssen, und, oder

heute, gestern, morgen, früh, spät, Vormittag, Nachmittag, Abend, Nacht, war

Das gemeinsame Lesen des Buches „Die kleine Raupe Nimmersatt“ eignet sich besonders gut, um die Kommunikationsfunktion „Erweiterte Zeitkonzepte ausdrücken“ zu vermitteln. Wiederholen Sie in möglichst vielen verschiedenen Alltagssituationen die Wörter des Wortschatzmoduls 12, damit Ihr Talkerbenutzer erleben kann, wie er spezifische Zeitwörter einsetzen kann: beim Morgenkreis, beim Planen von Freizeit- und Wochenendaktivitäten, beim abendlichen Erzählen vom Tag...

PRD-IDEEN DES MONATS

Die „PRD-Ideen des Monats“ sind ein kostenloser Service der Prentke Romich GmbH. METACOM Symbole © Annette Kitzinger

Nutzung auf eigene Gefahr. Die Prentke Romich GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die aus der Befolgung der hier gemachten Angaben resultieren könnten.

Das Ein- bzw. Austragen in den Newsletter erfolgt unter www.prentke-romich.de.
Elektronische Kommunikationshilfen

Prentke Romich GmbH

34119 Kassel

Tel. (0561) 78559-0

Fax (0561) 78559-29

E-Mail info@prentke-romich.de

Web www.prentke-romich.de

Das ist nicht genug!

In der hellen Nacht liegt auf einem Blatt ein kleines Ei.

Früh an einem schönen Sonntagmorgen geht die Sonne auf, hell und warm.

Da kommt aus dem Ei -knack- eine kleine Raupe raus und sagt:
„Ich habe Hunger!“

Sie geht los und sucht Essen.

Am Montagvormittag isst sie sich durch einen Apfel.

Dann sagt sie: „Das ist nicht genug. Ich will mehr essen.“

Am Dienstagnachmittag isst sie sich durch zwei Birnen.

Dann sagt sie: „Das ist nicht genug. Ich will mehr essen.“

Am Mittwochabend isst sie sich durch drei Pflaumen.

Dann sagt sie: „Das ist nicht genug. Ich will mehr essen.“

In der Nacht zum Donnerstag isst sie sich durch vier Erdbeeren.

Dann sagt sie: „Das ist nicht genug. Ich will mehr essen.“

Am Freitagmorgen isst sie sich durch fünf Apfelsinen.

Dann sagt sie: „Das ist nicht genug. Ich will mehr essen.“

Am Sonntag isst sie sich von früh bis spät durch einen Kuchen aus Schokolade, durch ein Eis, durch eine saure Gurke, durch einen Käse, durch eine Wurst, durch einen Lutscher, durch ein Brot aus Früchten, durch ein Würstchen, durch eine kleine Torte und durch eine Melone.

An diesem Abend hat sie Bauchschmerzen!

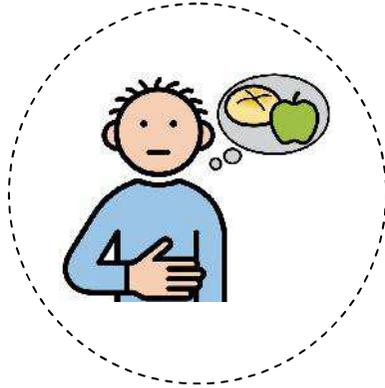
Der neue Tag ist wieder ein Sonntag. Die Raupe isst sich durch ein grünes Blatt. Dann geht es ihr nicht mehr so schlecht.

Jetzt hat sie einen dicken vollen Bauch und will nicht mehr essen. Sie hat genug gegessen.

Sie baut sich ein kleines Haus, das heißt Kokon. Da bleibt sie mehr als zwei Wochen lang. Dann isst sie ein kleines Fenster in das Haus und schiebt sich nach draußen.


Und ist ein sehr, sehr schöner Schmetterling!

Tastensymbol für eine sprechende Taste Variante 1




Das ist nicht genug.
Ich will mehr essen.

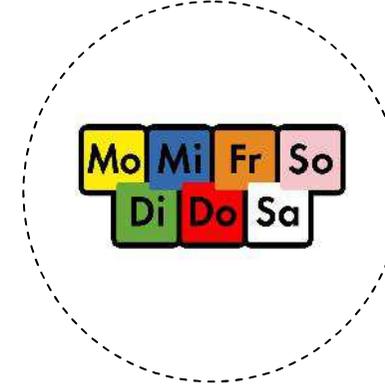Tastensymbol für eine sprechende Taste Variante 2




Wochentage

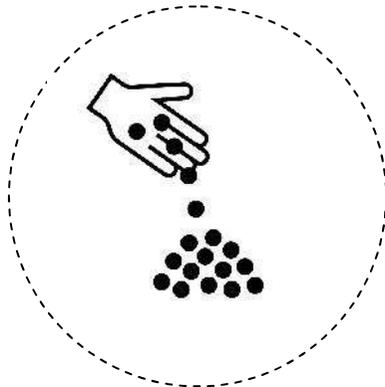Tastensymbole für zwei sprechende Tasten



mehr

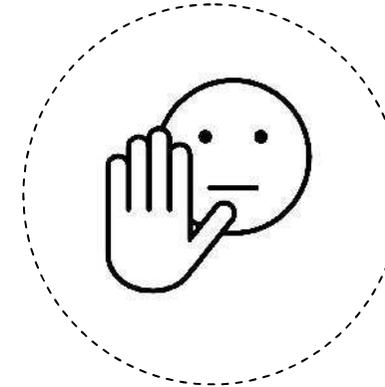

genug

Feld 1: „Montag“

Feld 2: „Dienstag“

Feld 3: „Mittwoch“

Feld 4: „Donnerstag“

Feld 5: „Freitag“

Feld 6: „Samstag“



Feld 7: „Sonntag“

Feld 8: „Das ist nicht genug! Ich will mehr essen.“

SuperTalker © Prentke Romich GmbH 2012 Symbole: Annette Kitzingner

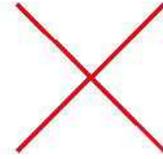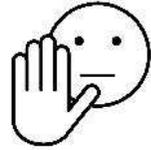EBENE  Das ist nicht genug! TASTEN 



mehr

genug

nicht

Mo

Di

Mi

Montag

Dienstag

Mittwoch

Do

Fr

Sa

Donnerstag

Freitag

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
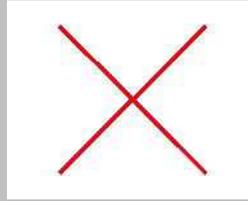
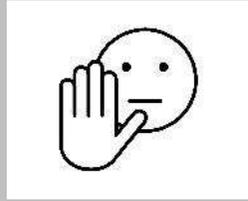
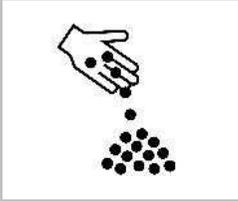
Samstag

So








Sonntag



Das ist nicht genug!
Ich will mehr essen.





mehr
fertig
nicht

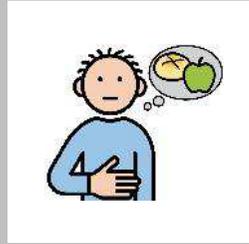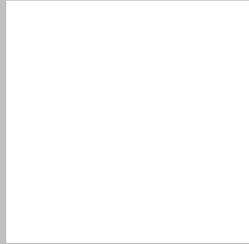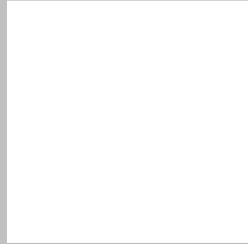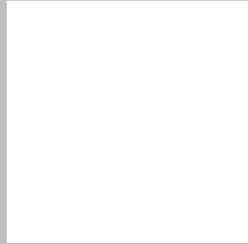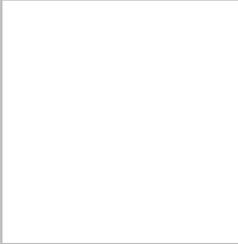

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
Das ist nicht genug!
Ich will mehr essen.




















Montag
Dienstag
Mittwoch

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

Donnerstag

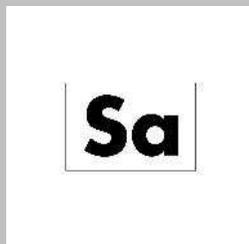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

Freitag
Samstag
Sonntag
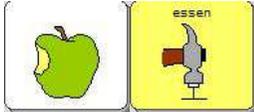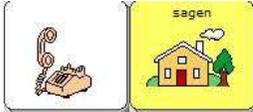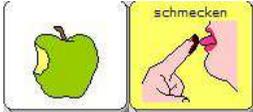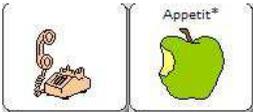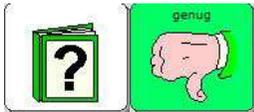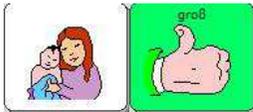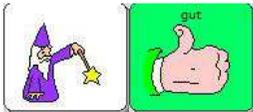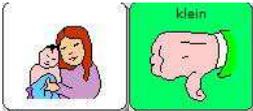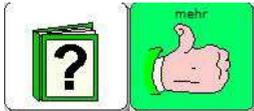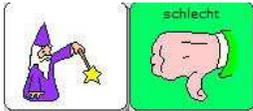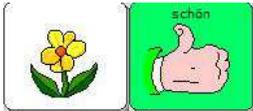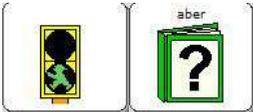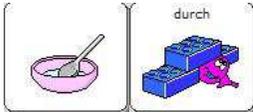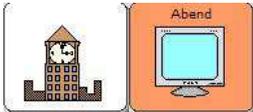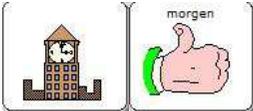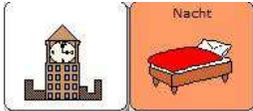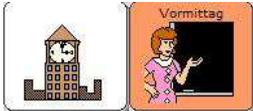
<p>sie</p>  <p>QK32 2012.11</p>	<p>essen</p>  <p>QK32 2012.11</p>	<p>sagen</p>  <p>QK32 2012.11</p>	<p>schmecken</p>  <p>QK32 2012.11</p>
<p>Guten Appetit!</p>  <p>QK32 2012.11</p>	<p>genug</p>  <p>QK32 2012.11</p>	<p>groß</p>  <p>QK32 2012.11</p>	<p>gut</p>  <p>QK32 2012.11</p>
<p>klein</p>  <p>QK32 2012.11</p>	<p>mehr</p>  <p>QK32 2012.11</p>	<p>schlecht</p>  <p>QK32 2012.11</p>	<p>schön</p>  <p>QK32 2012.11</p>
<p>aber</p>  <p>QK32 2012.11</p>	<p>nicht</p>  <p>QK32 2012.11</p>	<p>durch</p>  <p>QK32 2012.11</p>	<p>Abend</p>  <p>QK32 2012.11</p>
<p>morgen</p>  <p>QK32 2012.11</p>	<p>Nachmittag</p>  <p>QK32 2012.11</p>	<p>Nacht</p>  <p>QK32 2012.11</p>	<p>Vormittag</p>  <p>QK32 2012.11</p>

Ich habe Hunger!



QK32

2012.11

Wochentage



QK32

2012.11

Lebensmittel



QK32

2012.11

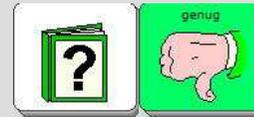
das ist



nicht



genug




QK32 2012.11


ich will














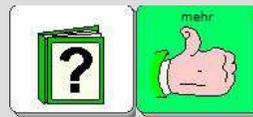
mehr




essen

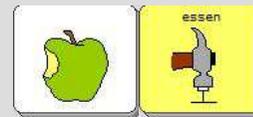

QK32 2012.11
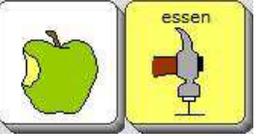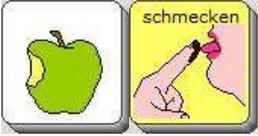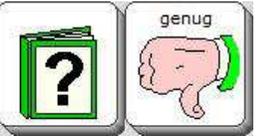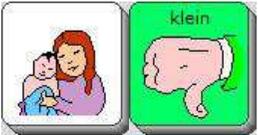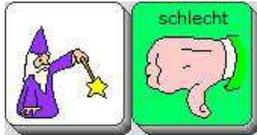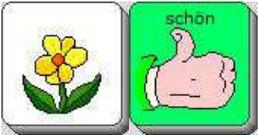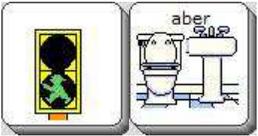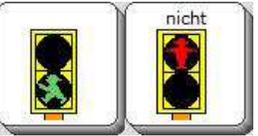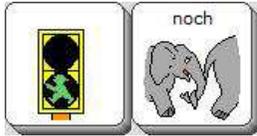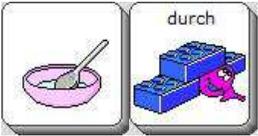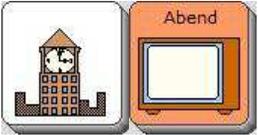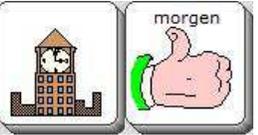
<p>sie</p>  <p>QK45 2012.11</p>	<p>essen</p>  <p>QK45 2012.11</p>	<p>sagen</p>  <p>QK45 2012.11</p>	<p>schmecken</p>  <p>QK45 2012.11</p>
<p>Guten Appetit!</p>  <p>QK45 2012.11</p>	<p>genug</p>  <p>QK45 2012.11</p>	<p>groß</p>  <p>QK45 2012.11</p>	<p>gut</p>  <p>QK45 2012.11</p>
<p>klein</p>  <p>QK45 2012.11</p>	<p>mehr</p>  <p>QK45 2012.11</p>	<p>schlecht</p>  <p>QK45 2012.11</p>	<p>schön</p>  <p>QK45 2012.11</p>
<p>aber</p>  <p>QK45 2012.11</p>	<p>nicht</p>  <p>QK45 2012.11</p>	<p>noch</p>  <p>QK45 2012.11</p>	<p>durch</p>  <p>QK45 2012.11</p>
<p>Abend</p>  <p>QK45 2012.11</p>	<p>morgen</p>  <p>QK45 2012.11</p>	<p>Nachmittag</p>  <p>QK45 2012.11</p>	<p>Nacht</p>  <p>QK45 2012.11</p>

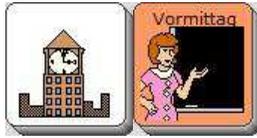Vormittag



QK45

2012.11

Ich habe Hunger!



QK45

2012.11

Wochentage



QK45

2012.11

Lebensmittel



QK45

2012.11

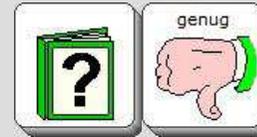
das ist



nicht



genug




QK45 2012.11


ich will



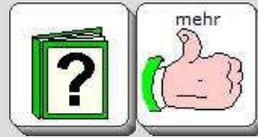mehr



essen

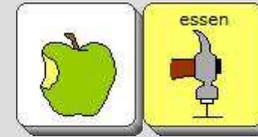

QK45 2012.11

ich habe



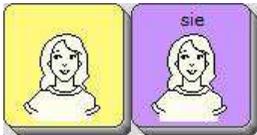
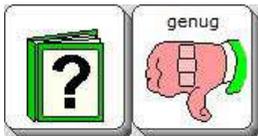
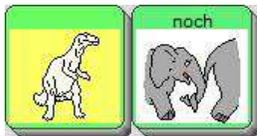
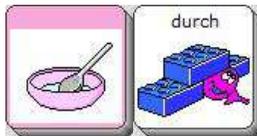
noch



Hunger



QK45 2012.11


<p>sie</p>  <p>QK60 2012.11</p>	<p>essen</p>  <p>QK60 2012.11</p>	<p>sagen</p>  <p>QK60 2012.11</p>	<p>schmecken</p>  <p>QK60 2012.11</p>
<p>Guten Appetit!</p>  <p>QK60 2012.11</p>	<p>genug</p>  <p>QK60 2012.11</p>	<p>groß</p>  <p>QK60 2012.11</p>	<p>gut</p>  <p>QK60 2012.11</p>
<p>klein</p>  <p>QK60 2012.11</p>	<p>mehr</p>  <p>QK60 2012.11</p>	<p>schlecht</p>  <p>QK60 2012.11</p>	<p>schön</p>  <p>QK60 2012.11</p>
<p>aber</p>  <p>QK60 2012.11</p>	<p>nicht</p>  <p>QK60 2012.11</p>	<p>noch</p>  <p>QK60 2012.11</p>	<p>durch</p>  <p>QK60 2012.11</p>
<p>Abend</p>  <p>QK60 2012.11</p>	<p>morgen</p>  <p>QK60 2012.11</p>	<p>Nachmittag</p>  <p>QK60 2012.11</p>	<p>Nacht</p>  <p>QK60 2012.11</p>

Vormittag



QK60 2012.11

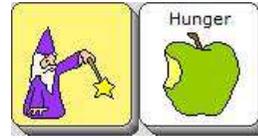Ich habe Hunger!



QK60 2012.11

Wochentage



QK60 2012.11

Lebensmittel



QK60 2012.11

das



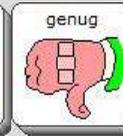
ist



nicht



genug



QK60 2012.11

ich will



mehr



essen



QK60 2012.11

ich habe



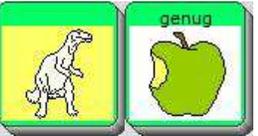
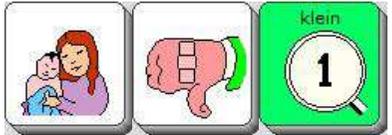
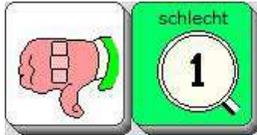
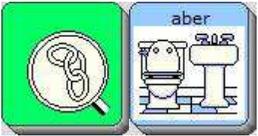
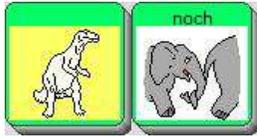
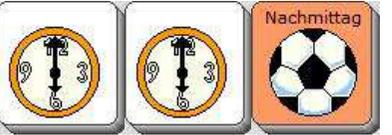
noch



Hunger



QK60 2012.11

<p>sie</p>  <p>WS84 2012.11</p>	<p>essen</p>  <p>WS84 2012.11</p>	<p>sagen</p>  <p>WS84 2012.11</p>	<p>schmecken</p>  <p>WS84 2012.11</p>
<p>Guten Appetit!</p>  <p>WS84 2012.11</p>	<p>genug</p>  <p>WS84 2012.11</p>	<p>groß</p>  <p>WS84 2012.11</p>	<p>gut</p>  <p>WS84 2012.11</p>
<p>klein</p>  <p>WS84 2012.11</p>	<p>mehr</p>  <p>WS84 2012.11</p>	<p>schlecht</p>  <p>WS84 2012.11</p>	<p>schön</p>  <p>WS84 2012.11</p>
<p>aber</p>  <p>WS84 2012.11</p>	<p>nicht</p>  <p>WS84 2012.11</p>	<p>noch</p>  <p>WS84 2012.11</p>	<p>durch</p>  <p>WS84 2012.11</p>
<p>Abend</p>  <p>WS84 2012.11</p>	<p>Morgen</p>  <p>WS84 2012.11</p>	<p>Nachmittag</p>  <p>WS84 2012.11</p>	<p>Nacht</p>  <p>WS84 2012.11</p>


Vormittag



WS84

2012.11

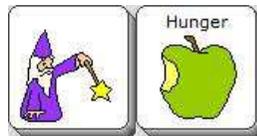Ich habe Hunger



WS84

2012.11

Wochentage



WS84

2012.11

Lebensmittel



WS84

2012.11

das



ist



nicht



genug



WS84 2012.11

ich will



mehr



essen



WS84 2012.11

ich habe



noch

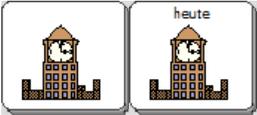
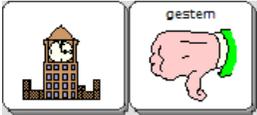
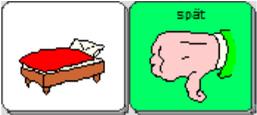
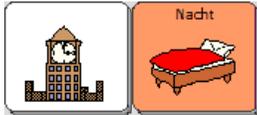


Hunger







WS84 2012.11



Der Benutzer verwendet spezifische Zeitwörter.

<p>heute</p>  <p>QK32 Modul 12</p>	<p>gestern</p>  <p>QK32 Modul 12</p>	<p>morgen</p>  <p>QK32 Modul 12</p>	<p>früh</p>  <p>QK32 Modul 12</p>
<p>spät</p>  <p>QK32 Modul 12</p>	<p>Vormittag</p>  <p>QK32 Modul 12</p>	<p>Nachmittag</p>  <p>QK32 Modul 12</p>	<p>Abend</p>  <p>QK32 Modul 12</p>
<p>Nacht</p>  <p>QK32 Modul 12</p>			

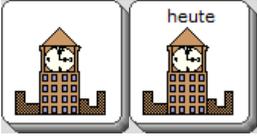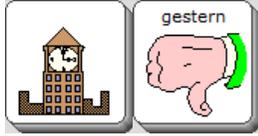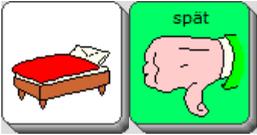
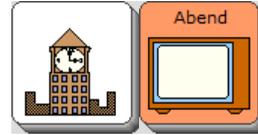
Der Benutzer verwendet spezifische Zeitwörter.

<p>heute</p>  <p>QK45 Modul 12</p>	<p>gestern</p>  <p>QK45 Modul 12</p>	<p>morgen</p>  <p>QK45 Modul 12</p>	<p>früh</p>  <p>QK45 Modul 12</p>
<p>spät</p>  <p>QK45 Modul 12</p>	<p>Vormittag</p>  <p>QK45 Modul 12</p>	<p>Nachmittag</p>  <p>QK45 Modul 12</p>	<p>Abend</p>  <p>QK45 Modul 12</p>
<p>Nacht</p>  <p>QK45 Modul 12</p>			

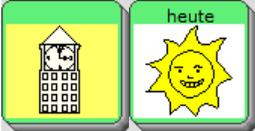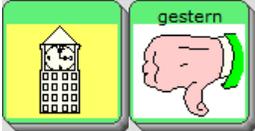Der Benutzer verwendet spezifische Zeitwörter.

<p>heute</p>  <p>QK60 Modul 12</p>	<p>gestern</p>  <p>QK60 Modul 12</p>	<p>morgen</p>  <p>QK60 Modul 12</p>	<p>früh</p>  <p>QK60 Modul 12</p>
<p>spät</p>  <p>QK60 Modul 12</p>	<p>Vormittag</p>  <p>QK60 Modul 12</p>	<p>Nachmittag</p>  <p>QK60 Modul 12</p>	<p>Abend</p>  <p>QK60 Modul 12</p>
<p>Nacht</p>  <p>QK60 Modul 12</p>	<p>war</p>  <p>QK60 Modul 12</p>		

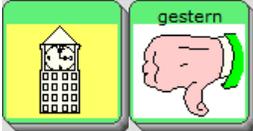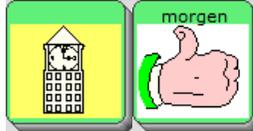Der Benutzer verwendet spezifische Zeitwörter.

<p>heute</p>  <p>WS84 Modul 12</p>	<p>gestern</p>  <p>WS84 Modul 12</p>	<p>morgen</p>  <p>WS84 Modul 12</p>	<p>früh</p>  <p>WS84 Modul 12</p>
<p>spät</p>  <p>WS84 Modul 12</p>	<p>Vormittag</p>  <p>WS84 Modul 12</p>	<p>Nachmittag</p>  <p>WS84 Modul 12</p>	<p>Abend</p>  <p>WS84 Modul 12</p>
<p>Nacht</p>  <p>WS84 Modul 12</p>	<p>war</p>  <p>WS84 Modul 12</p>		