

PRD-IDEEN DES MONATS

Ich heiÙe – Ich mag

Wollknäuelwurf

Dieses Kennenlernspiel erleichtert in einer neuen Gruppe das Namen-Lernen und die Teilnehmer erfahren von den Mitspielern, was deren Lieblingsessen und deren Lieblingstier ist.

DIESE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:

- 1-2 Wollknäuel mit ausreichender Länge

DIESE PRD-PRODUKTE KÖNNEN EINGESETZT WERDEN:

- MINSPEAK®-Anwendungsprogramme Quasselkiste 45/60 oder Wortstrategie 84
- Anwendungsprogramme LoGoFoXX 32 oder LoGoFoXX 60
- Wortschatz-App GoTalk Now
- GoTalk9+ oder GoTalk20+
- 1-2 sprechende Tasten (z.B. BIGmack oder Step-by-Step)

DAS GEHÖRT ZUR VORBEREITUNG:

- Verwendet Ihr Talkerbenutzer ein Anwendungsprogramm, drucken Sie die Datei mit den Sequenzen des entsprechenden Programms aus.
- Verwendet Ihr Benutzer die Wortschatz-App GoTalk Now, laden Sie die Vorlage "PRD-Idee September 2020" aus der Online Galerie oder von unserer Homepage herunter (<https://www.prentke-romich.de/prd-ideen-des-monats-jetzt-auch-fuer-gotalk-now/>).
- Zur Benutzung des GoTalks verwenden Sie das beigefügte Deckblatt. Besprechen Sie das Gerät gemäß den Vorschlägen. Ergänzen Sie die Äußerungen individuell mit dem Namen des Teilnehmers, seinem Lieblingsessen und seinem Lieblingstier.
- Beim Einsatz einer sprechenden Taste kennzeichnen Sie das Gerät mit den Symbolen und nehmen die entsprechenden Aussagen auf.

JETZT KANN ES LOSGEHEN!

- Die Spielteilnehmer ordnen sich in einem Kreis an.
- Der Spielleiter nennt in der ersten Runde seinen Namen und sein Lieblingstier.
- Nun wirft er den Wollknäuel einem beliebigen Mitspieler in der Runde zu, behält dabei den Anfang der Schnur fest in der Hand. Der Mitspieler sagt ebenfalls wie er heißt und welches Tier er mag und wirft die Wolle weiter. Wiederum muss der Faden festgehalten werden.
- Das Spinnennetz ist fertig, sobald jeder in der Runde an der Reihe war.
- In der 2. Spielrunde nennen die Spielteilnehmer erneut ihre Namen und dann ihr Lieblingsessen.
- Die Aktivität kann auch mit anderen Themen, wie Lieblingsspiel, Lieblingssport, Lieblingsgetränk, Lieblingsfahrzeug etc. variiert werden.

SO KANN ES WEITERGEHEN:

Vermitteln Sie den Einsatz der Äußerungen „Ich heiÙe“, „Ich mag“ / „mögen“ auch in anderen Spiel- und Alltagssituationen. Weitere Ideen finden Sie in der Datei „Zielwörter und Kurzideen“.

Die „PRD-Ideen des Monats“ sind ein kostenloser Service der Prentke Romich GmbH. Nutzung auf eigene Gefahr. Die Prentke Romich GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die aus der Befolgung der hier gemachten Angaben resultieren könnten. Das Ein- bzw. Austragen in den Newsletter erfolgt unter www.prentke-romich.de.

Prentke Romich GmbH
Hilfsmittel für Unterstützte Kommunikation
Karthäuserstr. 3
34117 Kassel
Tel. (0561) 78559-0
Fax (0561) 78559-29
E-Mail info@prentke-romich.de
Web www.prentke-romich.de

