

# PRD-IDEEN DES MONATS

## 1 - 2 - 3

### Monster basteln

Benötigen Sie noch Deko für Halloween? Dann basteln Sie doch mit Ihrem UK-Benutzer ein Monster – z.B. mit einem großen Auge, vielen Haaren, zwei blauen Zähnen, drei Armen und einem Bein.

#### DIESE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:

- Tonkarton in verschiedenen Farben
- Bleistift, Schere und Klebestift

#### DIESE PRD-PRODUKTE KÖNNEN EINGESETZT WERDEN:

- MINSPEAK®-Anwendungsprogramme Quasselkiste 45/60 oder Wortstrategie 84
- Anwendungsprogramme LoGoFoXX 32 oder LoGoFoXX 60
- Wortschatz-App GoTalk Now
- GoTalk9+ oder GoTalk20+
- 1-2 sprechende Tasten (z.B. Step-by-Step oder 2 BIGmacks)

#### DAS GEHÖRT ZUR VORBEREITUNG:

- Verwendet Ihr Talkerbenutzer ein Anwendungsprogramm, drucken Sie die Datei mit den Sequenzen des entsprechenden Programms aus.
- Verwendet Ihr Benutzer die Wortschatz-App GoTalk Now, laden Sie die Vorlage "PRD-Idee November 2020" aus der Online Galerie oder von unserer Homepage herunter (<https://www.prentke-romich.de/prd-ideen-des-monats-jetzt-auch-fuer-gotalk-now/>).
- Zur Benutzung des GoTalks verwenden Sie das beigefügte Deckblatt. Besprechen Sie das Gerät gemäß den Vorschlägen.
- Beim Einsatz sprechender Tasten kennzeichnen Sie die Geräte mit den Symbolen und nehmen die entsprechenden Aussagen auf.

#### JETZT KANN ES LOSGEHEN!

- Erzählen Sie Ihrem UK-Benutzer von dem Vorhaben, gemeinsam ein Monster zu basteln. Ihr UK-Benutzer entscheidet hierbei, wie das Monster aussehen soll!
- Welche Farbe soll der Kopf haben (z.B. „Kopf - grün“)? Malen Sie einen Kreis in der Größe eines Papptellers auf. Lassen Sie Ihren UK-Benutzer den Kopf ausschneiden.
- Nun sind nach und nach alle anderen Körperteile an der Reihe. Der UK-Benutzer kann entscheiden, in welcher Anzahl, in welcher Farbe und in welcher Größe sie gebastelt und aufgeklebt werden sollen.
- Modellieren Sie je nach Benutzer 2- oder 3-Wort-Äußerungen (z.B. „Auge - drei“, „kein Haar“, „Zahn - gelb - zwei“). Modellieren Sie je nach Benutzer auch grammatische Formen (z.B. „drei - große - Augen“, „keine - Haare“, „zwei gelbe Zähne“).

#### SO KANN ES WEITERGEHEN:

Vermitteln Sie den Einsatz der Zahlen „1“, „2“ und „3“ auch in anderen Spiel- und Alltagssituationen. Weitere Ideen finden Sie in der Datei „Zielwörter und Kurzideen“.

Die „PRD-Ideen des Monats“ sind ein kostenloser Service der Prentke Romich GmbH. Nutzung auf eigene Gefahr. Die Prentke Romich GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die aus der Befolgung der hier gemachten Angaben resultieren könnten. Das Ein- bzw. Austragen in den Newsletter erfolgt unter [www.prentke-romich.de](http://www.prentke-romich.de).

#### Prentke Romich GmbH

Hilfsmittel für Unterstützte Kommunikation  
Karthäuserstr. 3  
34117 Kassel  
Tel. (0561) 78559-0  
Fax (0561) 78559-29  
E-Mail [info@prentke-romich.de](mailto:info@prentke-romich.de)  
Web [www.prentke-romich.de](http://www.prentke-romich.de)

