

AeroSwitch – Welche Betriebsart für welche Software?



Kurzübersicht für die Verbindung der AeroSwitch Funktaste mit den bei PRD erhältlichen Kommunikationssoftwares. Unter Verbindung herstellen wird nur beschrieben, wie man die AeroSwitch verbindet. Alle sonstigen Scanning-Einstellungen müssen je nach Bedarf zusätzlich eingestellt werden.

Software / App	Betriebsart	Verbindung herstellen
Accent / NuVoice	0 oder 1 oder 2	Toolbox → Menü Ansteuerung → Scanning wählen → AeroSwitch verbinden → AeroSwitch drücken
Accent / Empower	0 oder 1 oder 2	Toolbox → System → Geräte & Verbindungen → Tasten → Verbinden → AeroSwitch drücken
NovaChat / Chat	0 oder 1 oder 2	Menü → Einstellungen → Ansteuerung → Scanning → Ansteuerung mit Tasten → Taste 1 → AeroSwitch drücken
Quasselkiste App	0 oder 1 oder 2	Menü → Einstellungen → Scanning aktivieren → Tasten konfigurieren → Taste 1 → AeroSwitch drücken
GoTalk Now	3 oder 4	AeroSwitch in iOS-Einstellungen koppeln → Einstellungen in GTN öffnen → Scanning-Typ auf Bluetooth –Taster – Space und Enter stellen
Predictable	3 oder 4	AeroSwitch in iOS-Einstellungen koppeln → Einstellungen in PD öffnen → Auswahlmethode → Schaltersteuerung einrichten