



Bedienungsanleitung

# Kopfmaus NuPoint

## Hard-und Software

100007v1.3



Prentke Romich Deutschland  
Unterstützte Kommunikation

# Hinweise

© Prentke Romich GmbH 2015-2020. Kommerzielle Nutzung und Weiterveräußerung verboten.  
Accent, AeroSwitch, AeroText, Empower, Look, NuEye, NuPoint und NuVoice sind Warenzeichen der Prentke Romich Company.

Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

NuPoint Bedienungsanleitung

Version 1.3 • November 2020

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden. Prentke Romich GmbH geht damit keinerlei Verpflichtung ein. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Prentke Romich GmbH sind die vollständige oder teilweise Fotokopie und Reproduktion dieses Handbuches sowie die Übersetzung in andere Sprachen nicht zulässig.

Prentke Romich GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen für diese Unterlagen. Das gilt ohne Einschränkung auch für implizite Garantien auf Marktgängigkeit und Eignung dieses Geräts oder der hierin gemachten Angaben für einen bestimmten Zweck. Auch übernimmt die Prentke Romich GmbH über die gesetzliche Produkthaftung hinaus keine Haftung für irgendwelche Schäden, die sich aus der Anwendung und Nutzung dieses Geräts oder der in dieser Anleitung gemachten Angaben ergeben.

Hersteller	Der Bevollmächtigte in der EU	Importeur		
	<table border="1"><tr><td>EC</td><td>REP</td></tr></table>	EC	REP	
EC	REP			
<b>PRC-Saltillo</b> 1022 Heyl Road Wooster, OH 44691 U.S.A. Tel. +1 330 262-1984 Fax +1 330 262-4829 E-Mail info@prentrom.com Web prentrom.com	<b>Prentke Romich GmbH</b> Karthäuserstr. 3 D - 34117 Kassel Deutschland Tel. +49 (0) 561 7 85 59-0 Fax +49 (0) 561 7 85 59-29 E-Mail info@prentke-romich.de Web prentke-romich.de	<b>Liberator Ltd.</b> Whitegates, 25-27 High Street Swinstaed, Lincs, NG33 4PA Großbritannien Tel. +44 (0) 1733 370 470 Fax +44 (0) 1476 552 473 E-Mail info@liberator.co.uk Web liberator.co.uk		

## Dokumentenversion

100007v1.3 – 24.11.2020

Bezieht sich auf Modell NuPoint für Kommunikationshilfen vom Typ Accent mit Kommunikationssoftware NuVoice.

# Inhaltsverzeichnis

Hinweise .....	2
Sicherheitshinweise.....	4
Erläuterung der verwendeten Warnsymbole.....	4
Sicherheit.....	5
NuPoint montieren .....	12
NuPoint als Ansteuerungsmethode auswählen.....	13
NuPoint konfigurieren.....	14
Cursor- und Indikatoreinstellungen.....	16
Das Menü Hervorhebung .....	17
Tasten außerhalb des Displays.....	18
Internes Windows .....	19
Reflektorpunkte verwenden.....	22
Positionierungs- und Einstellungsempfehlungen .....	23
Positionierung.....	23
Einstellungen .....	23
Absoluter und relativer Modus.....	24
Der relative Modus.....	24
Der absolute Modus.....	24
Absoluten und relativen Modus verwenden .....	24
Ansteuerung mit NuPoint pausieren / fortsetzen.....	25
Pausieren-Taste oberhalb des Displays .....	25
Einfügbare Funktion „Pausieren/Fortsetzen“ .....	25
NuPoint-Statusanzeige .....	25
Index.....	26

# Sicherheitshinweise

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit internationalen Sicherheitsstandards entwickelt und hergestellt. Wie bei jedem anderen Elektrogerät müssen Sie jedoch die gebührende Vorsicht walten lassen, um eine optimale Funktionsweise und Sicherheit zu gewährleisten. Netzkabel, Netzteile und andere Komponenten können Sicherheitsrisiken erzeugen, die vor allem bei nicht sachgerechter Verwendung dieser Komponenten zu Personen- oder Sachschäden führen können. Um diese Risiken zu verringern, folgen Sie den in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen, beachten Sie alle Warnungen, die sich auf dem Produkt und in den Bedienungsanweisungen befinden, und lesen Sie die Informationen in dieser Anleitung sorgfältig. Sie können sich selbst vor Gefahren schützen und eine sichere Umgebung für die Nutzung dieses Geräts schaffen, indem Sie die Informationen in dieser Anleitung genau einhalten.

## Erläuterung der verwendeten Warnsymbole

In diesem Handbuch werden sechs (6) Warnsymbole zur Anzeige unterschiedlicher Warnstufen verwendet:

	Das Symbol „Hinweis“ soll den Benutzer auf wichtige Hinweise oder Punkte, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen, aufmerksam machen.
	Das Symbol „Tipps“ weist auf Punkte hin, an die der Benutzer möglicherweise nicht gedacht hat.
	Das Symbol „Achtung“ wird verwendet, um auf etwas hinzuweisen, das Schäden oder Fehlfunktionen an der Ausrüstung verursachen kann.
	Das Symbol „Gefahr“ wird verwendet, um darauf hinzuweisen, dass ein erhebliches Schadensrisiko für den Benutzer besteht, wenn der Warnhinweis nicht beachtet wird.
	Das Symbol „Hohe Temperatur“ weist auf hohe Oberflächentemperaturen hin, die zu Verletzungen führen oder unangenehme Empfindungen auslösen können.
	Das Symbol „Bitte von Kindern unter 3 Jahren fernhalten“ weist auf Erstickengefahr durch Verschlucken kleiner Teile sowie auf Verletzungsgefahr durch scharfe Spitzen und Kanten einzelner Bauteile hin.

## Sicherheit

### Notfallgerät

---



Dieses Gerät ist nicht gedacht oder geeignet als Notrufgerät oder als alleinige Kommunikationshilfe. Falls dieses Gerät ausfällt, kann es vom Benutzer nicht zur Kommunikation verwendet werden.

---

### Reinigung, Wartung, Service

---



Das Gerät nicht reinigen oder warten, während es in Benutzung ist. Ziehen Sie das Ladegerät ab und schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen, hygienisch aufarbeiten oder eine Wartung durchführen.



Das Gerät verfügt über keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen und demontieren Sie das Gehäuse nicht. Das Gerät könnte undicht werden, es könnte Feuchtigkeit in das Gerät eindringen und elektronische Bauteile werden dabei freigesetzt.



Ist das Gerät oder ein Zubehörteil beschädigt, wenden Sie sich an den Kundendienst des Händlers, von dem Sie das Gerät bekommen haben. Versuchen Sie nicht, Reparaturen selber durchzuführen.

---

### Zubehör

---



Verwenden Sie Zubehörteile, abnehmbare Teile und Materialien nur wie in dieser Anleitung beschrieben.



Verwenden Sie keine Zubehörteile, abnehmbare Teile oder Materialien, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind.

---

### Montage und Positionierung

---



Tisch- und Rollstuhlhalterungen sowie Bett- bzw. Bodenständer (Floor Mount) sind nur durch qualifiziertes Personal aufzubauen und einzustellen. Bei fehlerhaft montierten oder befestigten Halterungen droht erhebliches Verletzungsrisiko!



Zur Vermeidung von Muskel-, Gelenk- und Skeletterkrankungen (RSI, Repetitive Strain Injury) darf die Positionierung des Geräts nur durch qualifiziertes Personal erfolgen.



Stellen Sie sicher, dass die Sicht des Benutzers durch das Gerät nicht behindert wird.

---

### Seh- und Hörvermögen

---



Wenn Sie eine Brille benutzen, konsultieren Sie Ihren Augenarzt oder Augenoptiker bzgl. einer Nutzung und der Positionierung des Geräts.



Vermeiden Sie bei Benutzung eines Kopfhörers hohe Lautstärken, da diese auf Dauer das Gehör beeinträchtigen können. Wählen Sie eine geringe Lautstärke und erhöhen Sie diese ggf. nur leicht, um komfortabel hören zu können.

---

### Kleinteile, Kabel, Leitungen, Ständer, Gurte und Schlaufen

---



Kabel, Leitungen, Schlaufen und Gurte stellen eine Gefährdung durch Erfassen oder Aufwickeln sowie ein potentielles Strangulationsrisiko dar. Berücksichtigen Sie dies beim Positionieren des Geräts sowie beim Anschluss von Zubehör wie externen Tasten.



Prüfen Sie Stecker und Kabel regelmäßig auf Beschädigungen. Im Falle einer Beschädigung schalten Sie das Gerät umgehend aus und wenden Sie sich an den Kundendienst des Herstellers.



Wenn Sie ein Kabel abziehen, halten Sie es am Stecker und ziehen Sie nicht am Kabel. Anderenfalls riskieren Sie eine Beschädigung des Kabels / der Leitung.



Schließen Sie kabelgebundenes Zubehör und das Netzteil nur wie in dieser Anleitung beschrieben an.

---



Kleinteile wie Schrauben, Schlaufen, USB-Sticks und Plastktüten nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen, es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!



Verwahren Sie den mitgelieferten USB-Stick an einem sicheren Ort und lassen Sie ihn nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen. Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

## Bildschirm



Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Bildschirm beschädigt, gesplittert oder zerbrochen ist.



Entfernen Sie den Touchscreen (die berührungsempfindliche Schicht auf dem Display) nicht. Der Touchscreen schützt Sie vor Glassplittern im Falle eines Displaybruchs.

## Interferenzen



Wenn Sie dies Gerät in einer medizinischen Umgebung benutzen, folgen Sie den Anweisungen für mobile Geräte und Smartphones.



Verwenden Sie dies Gerät nicht in der Nähe von Geräten, die elektromagnetische Störungen verursachen, es können Interferenzen auftreten. Entfernen Sie sich wenn möglich von der Störquelle.

## Feuchtigkeit



Das Gerät niemals in Wasser eintauchen oder in feuchten Räumen betreiben. Vor Feuchtigkeit schützen!



Ist das Gerät mit Feuchtigkeit in Berührung gekommen, schalten Sie es umgehend aus. Lassen Sie das Gerät vor dem Wiedereinschalten komplett trocknen. Feuchtigkeit in der USB-Buchse können Sie entfernen, indem Sie das Gerät mit dem USB-Buchse nach unten richten und es mehrfach stark schütteln. Trocken Sie anschließend die USB-Buchse mit einem Mikrofasertuch. Wiederholen Sie den Vorgang so lange, bis sich keine Feuchtigkeit mehr in der USB-Buchse befindet.

## Ermüdung



Legen Sie regelmäßig Pausen bei der Benutzung ein, vor allem wenn Sie erst anfangen, eine Kopfsteuerung zu benutzen oder wenn die Nutzung der Kopfsteuerung Sie ermüdet oder wenn Sie trockene Augen bekommen.

## Krampfanfälle



Personen mit photosensitiver Epilepsie können anfällig sein für epileptische Anfälle oder Bewusstlosigkeit, wenn sie im alltäglichen Leben bestimmten Blinklichtern, Lichtmustern oder der Lichtquelle des Eyetrackers ausgesetzt sind. Solche Personen sollten das Gerät nicht unbeaufsichtigt verwenden. Der Benutzer sollte schnellstmöglich vom Gerät entfernt werden, wenn eines der folgenden Verhalten beobachtet wird: unwillkürliche Bewegungen, Desorientierung, Krämpfe, Zuckungen, Verlust des Bewusstseins oder Sehstörungen!

## Infrarotstrahlung



Das NuPoint-Modul sendet impulsartiges Infrarotlicht (IR) aus. Bestimmte medizinische Geräte sind anfällig für Störungen durch IR-Licht und/oder IR-Strahlung. Verwenden Sie die Augensteuerung daher nicht in der Nähe solcher Geräte. Ist Ihnen nicht klar, ob ein medizinisches Gerät empfindlich gegen Infrarotstrahlung ist, konsultieren Sie den Hersteller des Geräts.



Haben Sie Fragen zur Empfindlichkeit eines medizinischen Geräts gegenüber der Infrarotstrahlung des NuPoint-Moduls, konsultieren Sie den Hersteller des Geräts oder Ihren Gesundheitsdienstleister.

## Batterien und Laden



Befolgen Sie zum Laden des Geräts immer die in dieser Anleitung gemachten Angaben.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil zum Laden der in das Gerät eingebauten Akkus.



Die im Gerät eingebauten Akkus können nicht durch den Benutzer gewechselt werden.



Verwenden Sie das Gerät nicht an unübersichtlichen Stellen oder an Orten, wo das Netzteil nicht einfach abgezogen werden kann.



Führen Sie keine Objekte in die Ladebuchse ein, da diese die Buchse beschädigen könnten.



Zur Vermeidung eines Kurzschlusses oder eines Schadens am Gerät, laden Sie das Gerät nicht, wenn es nass ist oder in einer Umgebung, wo es nass werden könnte.



Bedienen Sie das Gerät, das Netzteil oder Zubehörteile nicht mit feuchten oder nassen Händen.



Laden Sie das Gerät nur sicheren, trockenen Umgebungen. Laden Sie das Gerät nicht außerhalb geschlossener Räume.



Halten Sie das Ladegerät fern von Wasser und stellen Sie sicher, dass es keiner Feuchtigkeit ausgesetzt ist.



Bei Ladegeräten mit mehreren Ländersteckern, verwahren Sie nicht benötigte Länderstecker an einen sicheren Ort auf. Ladestecker nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen, es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!



Ist das Ladegerät oder dessen Zuleitung beschädigt, wenden Sie sich an den Kundendienst.

## Wärme



Legen Sie das Gerät nicht in eine Mikrowelle oder einen Backofen und halten Sie es von offenen Flammen und Feuer fern.



Lassen Sie das Gerät nicht offen im Fahrzeug liegen, es könnte dort sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sein.

## Sauerstoffreiche Umgebung



Bringen Sie das Gerät nicht in sauerstoffreiche Umgebungen (Operationsräume, Sauerstoffzelte etc.).

## Die Oberfläche berühren



Das Berühren der Geräteoberfläche mit einer Hautverletzung kann die Wunde verschärfen



Kinder und andere Risikogruppen sollten die Geräteoberfläche nicht berühren, wenn die Möglichkeit einer Verbrennung besteht

## Entsorgung



Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für gebrauchte elektronische Produkte, über das die richtige Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung gemäß der bestehenden Gesetzgebung gewährleistet wird. Privathaushalte in den Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen können ihre gebrauchten elektronischen Produkte an vorgesehene Sammeleinrichtungen kostenfrei abgeben oder aber an den Händler zurückgeben, von dem sie es erworben haben.

## Implantierbare Medizinprodukte



Halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zwischen diesem tragbaren Gerät und einem implantierten Gerät wie Schrittmacher oder Kardioverter-Defibrillator, um potentielle Interferenzen mit diesem Gerät zu vermeiden.

Menschen, denen ein Gerät wie ein Schrittmacher oder Kardioverter-Defibrillator implantiert wurde, sollten

- **IMMER** einen Mindestabstand von mindestens 15 cm zwischen diesem Gerät und dem implantierten Gerät einhalten, solange dieses Gerät eingeschaltet ist;
- dieses Gerät nicht in einer Tasche oder am Gurt in einem Abstand von weniger als 15 cm vom implantierten Gerät tragen, da diesem Gerät nach dem Einschalten – auch dann, wenn es nicht verwendet wird – Signale aussenden kann. Dieses Gerät sollte stets auf der dem implantierten Gerät **ABGEWANDTEN** Seite getragen werden;
- dieses Gerät **SOFORT AUSSCHALTEN**, wenn die Gefahr einer Interferenz besteht.
- alle Anweisungen des Herstellers des implantierten Geräts lesen und befolgen. Haben Sie Fragen zur Verwendung dieses Geräts in Verbindung mit einem implantierten Gerät, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst des Herstellers des implantierten Geräts.

## **FCC-Erklärung**

Dieses Gerät wurde typengeprüft und entspricht laut Abschnitt 15 der Bestimmungen der US-Funk- und Fernmeldebehörde (Federal Communications Commission, FCC) den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B. Diese Bestimmungen dienen dazu, in Wohnräumen einen angemessenen Schutz gegen Funkstörungen zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet HF-Energie und strahlt diese u.U. auch ab. Bei unsachgemäßer Installation und unsachgemäßem Betrieb, die von den Anweisungen des Herstellers abweichen, kann eine Funkstörung auftreten. In bestimmten Installationen ist das Auftreten von Störungen jedoch nicht auszuschließen. Sollte dieses Gerät den Empfang von Funk- und Fernsehsendungen stören (Feststellbar durch das Ein- und Ausschalten dieses Gerätes), können die folgenden Behebungsmaßnahmen einzeln oder im Verbund eingesetzt werden:

- Verlegung oder Neuausrichtung der Empfangsantenne.
- Aufstellung des Gerätes in einer größeren Entfernung vom Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an eine andere Steckdose, so dass dieses Gerät und der Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.
- Gegebenenfalls kann der Fachhändler oder ein erfahrener Funk- und Fernseh-techniker weitere Ratschläge geben.

Änderungen und Modifikationen, die ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung der PRC-Salttillo vorgenommen wurden, können zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

## **Für Kanada**

Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt alle Anforderungen der kanadischen ICES-003-Bestimmungen. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## **Funktechnologien**

Geräte mit Funktechnologie wie drahtlose Netzwerkgeräte, Mobiltelefone, Schnurlos-telefone und ihre Basisstationen sowie Sprechfunkgeräte können dies Gerät beeinflussen. Halten Sie mit diesem Gerät stets einen Abstand von mindestens 15 cm zu Geräten mit Funktechnologie ein.

## **Limitierung auf Zweckbestimmung, Ansprüche Dritter und Datenverlust**

- PRC-Salttillo und/oder die Prentke Romich GmbH übernehmen keine Gewähr für irgendeine Funktionalität dieses Geräts außerhalb der ausdrücklichen Gewährleistung in Bezug auf die Zweckbestimmung als Kommunikationshilfe. PRC-Salttillo und/oder die Prentke Romich GmbH übernehmen keine Gewähr für Softwares von Dritten und sind nicht verantwortlich für Verletzungen, Schäden oder Verlusten, die aus Programmfunktionen oder Programmfehlern von Technologien von Dritten, Internetseiten, Produkten und Programmen resultieren. Weitere Anwendungen könnten eine weitere klinische Bestimmung über die Möglichkeiten eines Sprachausgabegeräts hinaus erforderlich machen.
- Weder die Prentke Romich GmbH noch PRC-Salttillo übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die Dritten durch die Benutzung dieses Geräts entstanden sein könnten.
- Weder die Prentke Romich GmbH noch PRC-Salttillo übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste im Falle eines Datenverlustes aufgrund einer Fehlfunktion, einer Reparatur oder eines Akkuwechsels. Sichern Sie stets alle relevanten Daten auf einem externen Speichermedium.

## **Verwendungszweck**

Dieses Gerät ist ein Hilfsmittel zur Unterstützten Kommunikation (UK) für Menschen, die aufgrund einer Verletzung, Behinderung oder Krankheit über eine eingeschränkte Sprechfähigkeit verfügen. Das Gerät ermöglicht seiner Benutzerin / seinem Benutzer verbesserte Möglichkeiten der Kommunikation und größere Unabhängigkeit.

Das Gerät inkl. seiner Software zur Sprachdarstellung gibt der Benutzerin / dem Benutzer die Möglichkeit, Konversationen zu initiieren, Informationen einzuholen, seine Meinung auszudrücken sowie Gefühle und Bedürfnisse mitzuteilen. Es kann zur Benutzung in der Hand gehalten oder mittels eines geeigneten Halterungssystems auf einem Tisch, an einem Rollstuhl oder an einem Bett befestigt werden. Die Ansteuerung kann – einzeln oder in Kombination – direkt mit der Hand erfolgen oder mittels geeigneter Eingabegeräte wie Maus, Trackball, Kopfmaus oder externe Tasten.

Das Gerät enthält keine medizinischen Substanzen, menschliches Blut oder Plasmaprodukte und wird ohne die Verwendung von Gewebe tierischen Ursprungs hergestellt.

## **Vorgesehene Nutzungsdauer**

Die vorgesehene Nutzungsdauer des Geräts, des Ladegeräts und des Zubehörs beträgt 5 Jahre. Entsorgen Sie das Gerät Entsorgen Sie das Gerät im Einklang mit den lokalen Vorschriften zur Abfallbeseitigung.

## **Vorgesehene Betreiber/Anwender**

Vorgesehene Betreiber/Anwender sind

- die Person, die das Gerät zur Kommunikation einsetzt,
- der Kommunikationspartner der Person, die das Gerät zur Kommunikation einsetzt
- Menschen, die Einstellungen im Gerät vornehmen, Gerätesoftware aktualisieren, das Gerät reinigen oder desinfizieren

Die in dieser Anleitung gemachten Angaben und Grafiken helfen den vorgesehenen Betreibern/Anwendern, das Gerät zweckbestimmt einzusetzen.

## **Position bei der Benutzung**

Bei normaler Benutzung befindet sich das Gerät in einem Abstand von 30 - 50 cm vor dem Benutzer. Um die Ansteuerung mit der Kopfmaus NuPoint zu ermöglichen, wird das Gerät in der Regel senkrecht oder sehr stark geneigt an einem Halterungssystem montiert.

## **Besondere Fähigkeiten und Vorkenntnisse**

Es sind keine besonderen Fähigkeiten oder Vorkenntnisse erforderlich, um das Gerät zu verwenden und/oder zu warten. Die in dieser Anleitung gemachten Angaben und Grafiken helfen den vorgesehenen Betreibern/Anwendern, das Gerät zweckbestimmt einzusetzen.

## **Bedienungsanleitung**

- Die Nutzung aller Gerätefunktionen ist für den Benutzer unbedenklich. Um beste Ergebnisse zu erzielen, befolgen Sie die Angaben in dieser Anleitung.
- Vorkommnisse melden Sie bitte umgehend Ihrem Händler, der Prentke Romich GmbH sowie ihrer zuständigen Aufsichtsbehörde.

- Informationen zur Reinigung und zu hygienischen Wiederaufarbeitung finden Sie in den Kapiteln „Reinigung“ und „Hygienische Wiederaufarbeitung“ in der Bedienungsanleitung der jeweiligen Kommunikationshilfe.

### **Kontaktinformation**

Benötigen Sie Hilfe bei der Einrichtung, Benutzung oder Wartung des Geräts oder wollen Sie ein ungewöhnliches Verhalten oder ein ungewöhnliches Ereignis des Geräts melden, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die Prentke Romich GmbH unter Tel. +49 (0)561 78559-16 bzw. E-Mail [technik@prentke-romich.de](mailto:technik@prentke-romich.de).

### **Informationen zur Lagerung**

Sollten Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen wollen, so fahren Sie es komplett herunter. Lagern Sie das Gerät an einen kühlen, trockenen Ort. Gelagerte Geräte müssen spätestens alle 6 Monate geladen werden.

## NuPoint montieren

Für die Accent-Geräte (Accent 800-20, Accent 800-30, Accent 1000-20, Accent 1000-30, Accent 1400 und Accent 1400-30) steht optional die interne Kopfmaus NuPoint zur Verfügung. Haben Sie Ihren Accent mit Kopfmaus bestellt, so wurde diese bereits montiert. Wollen Sie die Kopfmaus nachrüsten, so folgen Sie diesen Anweisungen zur Montage der Kopfmaus.

1. Drehen Sie den Accent um und legen Sie ihn flach auf den Tisch.
2. Haben Sie einen Rahmen montiert und dieser ist verschraubt, so entfernen Sie die beiden kleinen Schrauben oben im Bereich des Griffs bzw. der Portabdeckung. Verwahren Sie die Schrauben an einem sicheren Ort.
3. Entfernen Sie den Griff bzw. die Portabdeckung (siehe Accent-Hardwaremanual). Sie benötigen Sie dabei erhaltenen Schrauben zur Befestigung der Kopfmaus.
4. Richten Sie die Kopfmaus so aus, dass die beiden Schraubenlöcher in der Kopfmaus über den Gewindebuchsen des Accents liegen und der Mini-USB-Anschluss in der Mitte der Kopfmaus über der zugehörige Buchse des Accent liegt.



5. Schieben Sie die Kopfmaus in den Accent hinein. Versichern Sie sich, dass der USB-Stecker der Kopfmaus in der USB-Buchse des Accents steckt.
6. Befestigen Sie die Kopfmaus mit den beiden Schrauben.
7. Die Kopfmaus ist bereit zur Benutzung.




Kleinteile wie Schrauben nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen, es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

# NuPoint als Ansteuerungsmethode auswählen

Um NuPoint zu verwenden, müssen Sie Ihren Accent auf die Ansteuerungsart „Kopfmaus“ einstellen.

1. Öffnen Sie das Menü TOOLS und öffnen sie die Toolbox des Talkers.
2. Wählen Sie das Menü ANSTEUERUNG. Die aktuell eingestellte Ansteuerungsmethode wird angezeigt.

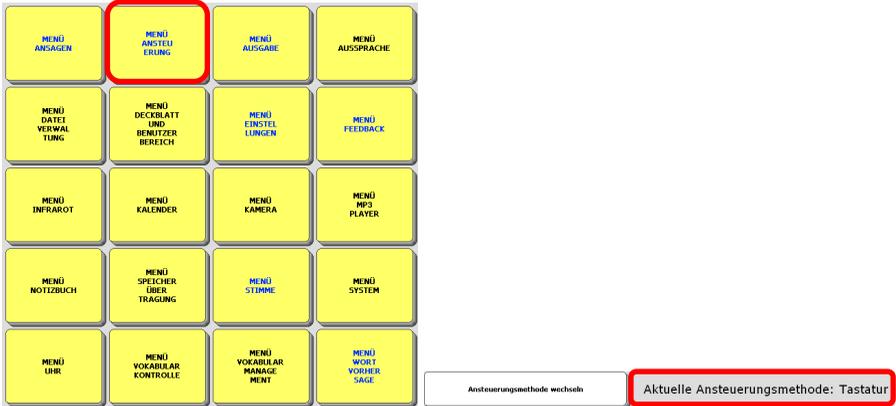


3. Sofern noch nicht geschehen, wählen Sie als Ansteuerungsmethode „NuPoint / Maus / Joystick“. Drücken Sie dazu auf „Ansteuerungsmethode wechseln“, „NuPoint / Maus / Joystick“ und dann „NuPoint“.



4. Zum Aktivieren der Änderungen und Verlassen des Menüs drücken Sie OK.
5. Die bei Ansteuerung mit NuPoint vorhandenen Optionen werden auf den folgenden Seiten vorgestellt

# NuPoint konfigurieren

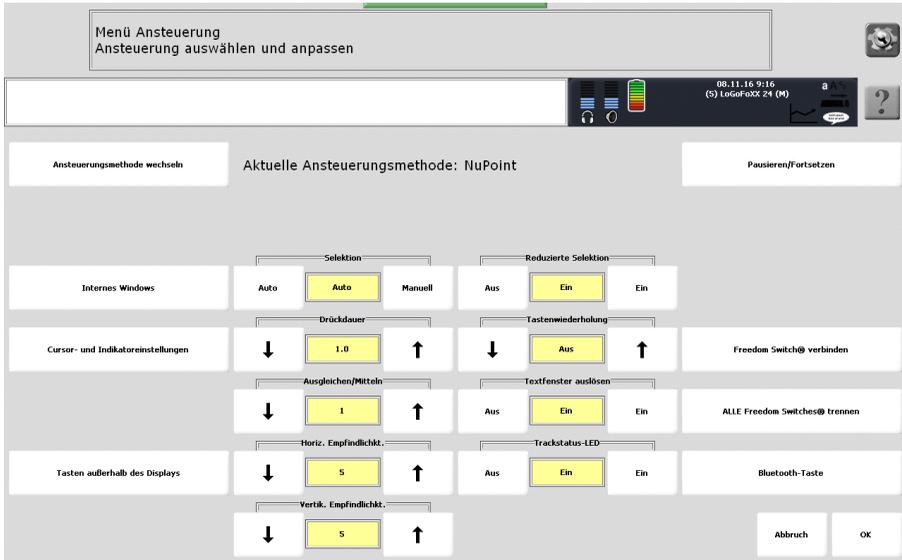

**Internes Windows (Option):** siehe S. 19

**Cursor- und Indikatoreinstellungen:** siehe S. 16.

**Selektion:** **Auto** bedeutet, dass der Talker den gewählten Bereich / das gewählte Feld automatisch nach Ablauf der unter Drückdauer eingestellten Zeit auswählt. **Manuell** bedeutet, dass hierfür eine externe Einertaste aktiviert werden muss.

**Drückdauer:** bei Selektion = Auto der Zeitraum, den der Mauszeiger auf einem Feld bleiben muss, damit dieses aktiviert wird. Bei Selektion = Manuell der Zeitraum, den die externe Einertaste gedrückt werden muss, damit der Talker das gerade ausgewählte Feld aktiviert.

**Ausgleichen/Mitteln:** Diese Option hilft, die Gefahr unabsichtlicher Tastenaktivierungen zu reduzieren, die durch unbeabsichtigte Kopfbewegungen ausgelöst werden können. Je höher Sie den Wert einstellen, desto weiter müssen Sie den Mauszeiger in ein anderes Tastenfeld hinein bewegen, bevor dieses als ausgewählt dargestellt wird.

**Horiz. Empfindlichkeit:** Stellen Sie hier die waagerechte Empfindlichkeit ein. Bei hoher Empfindlichkeit benötigen Sie nur geringe Kopfbewegungen zum Bewegen der Maus/Auswahl.

**Vertik. Empfindlichkeit:** Stellen Sie hier die senkrechte Empfindlichkeit ein. Bei hoher Empfindlichkeit benötigen Sie nur geringe Kopfbewegungen zum Bewegen der Maus/Auswahl.

**Reduzierte Selektion** (kann nur in Verbindung mit der Sequenzanzeige benutzt werden): Der Talker erlaubt nur das Auswählen belegter Tastenfelder, nicht belegte Tastenfelder können nicht ausgewählt werden.

**Tastenwiederholung:** Hier können Sie einstellen, ob und wie schnell ein Tastenfeld wiederholt aktiviert wird, wenn der Mauszeiger auf dem Feld bleibt (bei autom. Selektion) bzw. die linke Maustaste oder eine externe Einertaste (bei manueller Selektion) weiterhin gedrückt bleibt. Ein Wert von .50 bedeutet eine Wiederholung alle 0,5 Sekunden (= 2 Eingaben pro Sekunde).

**Textfenster auslösen:** Wenn aktiviert, kann auch das Textfenster mit der Maus ausgelöst werden. Dem Textfenster kann eine eigene Funktion zugewiesen werden. Standardmäßig ist es mit der Funktion „Alles sprechen“ belegt.

**Trackstatus-LED:** Sie können die LED in der Kopfmaus ausschalten, wenn Sie Ihnen z. B. zu hell ist. Bei ausgeschalteter LED bekommen Sie keine Rückmeldungen über den Trackstatus (grün = Reflektorpunkt gefunden, rot = Reflektorpunkt nicht gefunden).

**Freedom-Switch verbinden:** siehe NuVoice-Softwaremanual.

**Alle Freedom-Switches trennen:** siehe NuVoice-Softwaremanual.

**AeroSwitch® verbinden:** siehe NuVoice-Softwaremanual.

**Alle AeroSwitch® trennen:** siehe NuVoice-Softwaremanual.

**Bluetooth-Taste:** siehe NuVoice-Softwaremanual.

## Cursor- und Indikatoreinstellungen

Sie können eine Hervorhebung (Rahmen), einen Cursor (Mauszeiger) und einen Indikator (Ablaufanzeige) konfigurieren.

**Auswahl hervorheben:** Felder werden durch Rahmen, Invertieren, Füllen oder eine Kombination davon visualisiert.

**Hervorhebung anpassen:** siehe Seite 17.

**Cursor zeigen:** wählen Sie, ob ein Mauszeiger (Cursor) die aktuelle Position anzeigen soll.

**Cursorgröße:** wählen Sie die Größe der als Mauszeiger dargestellten Hand . Mögliche Werte sind klein, mittel und groß.

**Cursorfarbe:** wählen Sie die Farbe der als Mauszeiger dargestellten Hand.

**Indikatorfarbe:** der Indikator zeigt das aktuell ausgewählte Feld an. Zusätzlich zur Auswahl kann er den Ablauf der Drückdauer visualisieren.

**Indikator:** wählen Sie die Form des Indikators. Mögliche Optionen sind Viereck, Kreis und Kein (Aus).

**Indikatorgröße:** wählen Sie die Größe des Indikators. Mögliche Werte sind 5 - 75 Pixel.


**Indikatormodus:** wählen Sie die Art des Indikators. Mögliche Optionen sind animiert und statisch. Die Animation zeigt den Ablauf der Drückdauer.

**Indikatorrahmen:** wählen Sie die Größe des Indikators. Mögliche Werte sind 0, 2 und 4 Pixel.

**Indikatortransparenz:** wählen Sie die Transparenz des Indikators, d.h. wie durchsichtig er ist. Mögliche Werte sind 0 - 90%.

## Das Menü Hervorhebung

Der Talker kann Ihnen ein ausgewähltes Feld auf unterschiedliche Art visualisieren. Bei Ansteuerung mittels Kopfmaus NuPoint ist diese Rückmeldung hilfreich, um zu entscheiden, ob das vom Talker ermittelte Feld das gewünschte ist. Wählen Sie, ob und wie ein Feld auf diese Weise hervorgehoben werden soll.

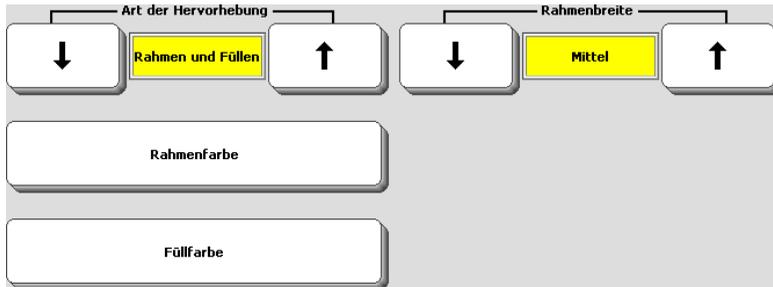

**Art der Hervorhebung:** wählen Sie zwischen Rahmen, Invertieren, Rahmen und Invertieren, Füllen und Rahmen und Füllen: ..

Rahmen	Invertieren	Rahmen und Invertieren	Füllen	Rahmen und Füllen

**Rahmenfarbe:** wählen Sie eine Farbe für den Rahmen.

**Füllfarbe** (nur bei Hervorhebung „Füllen“ und „Rahmen und Füllen“): wählen Sie die Füllfarbe.

**Rahmenbreite:** wählen Sie die Breite des Rahmens.

Sehr schmal	Schmal	Mittel	Breit	Sehr breit


## Tasten außerhalb des Displays

Der Talker verfügt über „virtuelle“ Tasten außerhalb des Displays.

- Oberhalb des Displays befindet sich die „Pausieren / Fortsetzen“-Taste zum Pausieren der Ansteuerung bzw. Fortsetzen nach dem Pausieren.
- Links vom Display befindet sich das Menü TOOLS mit 6 individuell belegbaren Tasten plus einer Taste zum Öffnen der Toolbox.
- Unterhalb des Displays befinden sich 10 individuell belegbare Tasten
- Rechts vom Display befinden sich 8 individuell belegbare Tasten.

Alle 4 Tastenblöcke können hier ein- und ausgeschaltet werden, weiterhin können Balken konfiguriert werden, die am jeweiligen Bildschirmrand auf die Tasten hinweisen und auf die man die Maus bzw. die Hervorhebung positionieren muss, um die jeweiligen Tasten sichtbar zu machen.


Hinweis: Zum Belegen der Tasten außerhalb des Displays siehe Kapitel „Benutzertaste bearbeiten“ im NuVoice-Softwaremanual.

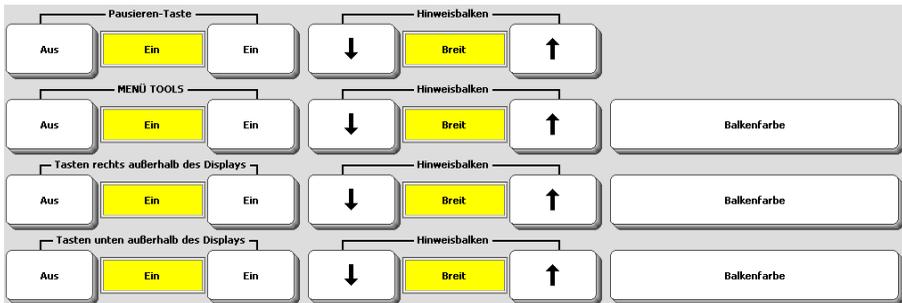

Den jeweiligen Tastenblock aktivieren Sie, indem Sie die Option auf „Ein“ stellen.

Wollen Sie einen Hinweisbalken angezeigt bekommen, stellen Sie die gewünschte Breite ein. Mögliche Werte sind Aus, Schmal, Mittel und Breit.

Wählen Sie die Farbe des jeweiligen Balkens. Der Balken für die oben befindliche Taste „Pausieren / Fortsetzen“ ist immer grün, die Farbe kann nicht verändert werden.

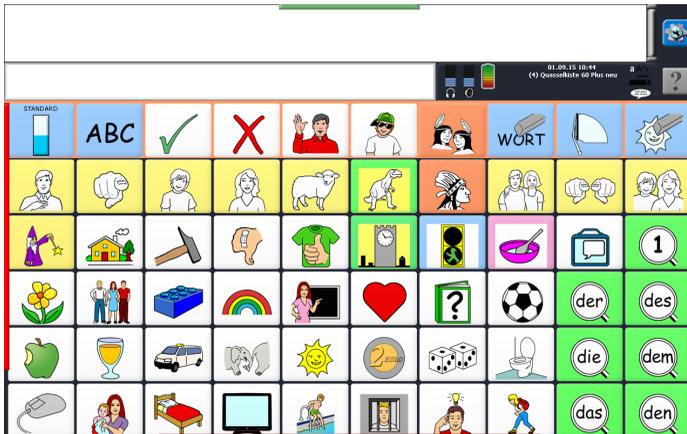

## Internes Windows

Im Falle eines offenen Systems stellen Sie hier ein, wie Sie mit der internem Kopf-  
maus NuPoint auf das Betriebssystem und Windows-Programme zugreifen wollen.

The image shows a settings menu for 'Internes Windows'. The 'Aus' button is highlighted in yellow. The menu items are:

- Klicken in Windows:** Aus, Ein (highlighted), Ein
- Mausklick nach Auswahl:** Aus, Aus (highlighted), Ein
- Lupe für Mausclick:** Aus, Aus (highlighted), Ein
- Windows-Ansteuerungsmethode:** ↓, Identisch (highlighted), ↑
- Vergrößerung:** ↓, 2x (highlighted), ↑
- Windows-Tastatur automatisch ausblenden:** Aus, Aus (highlighted), Ein
- Zu vergrößernder Bereich (Pixel):** ↓, 64 x 64 (highlighted), ↑
- Windows-Tastatur vergrößern:** Aus, Ein (highlighted), Ein

### Mausklick nach Auswahl

Wenn aktiviert, ermöglicht diese Funktion das automatische Ausführen einer Maus-  
klick-Aktion nach Auswahl eines Bildschirmpunktes.

### Einstellungen Mausklick nach Auswahl

The image shows the 'Einstellungen Mausklick nach Auswahl' settings menu. The 'Kasten' button is highlighted in yellow. The menu items are:

- Anordnung:** ↓, Kasten (highlighted), ↑
- Tastengröße:** ↓, Klein (highlighted), ↑
- Schriftgröße:** ↓, 12 (highlighted), ↑

Below the settings are four buttons labeled 'Nach Auswahl Taste 1', 'Nach Auswahl Taste 2', 'Nach Auswahl Taste 3', and 'Nach Auswahl Taste 4'.

**Anordnung:** wählen Sie, wie die 4 Tastenfelder mit Mausclick-Aktionen angezeigt  
werden: **Kasten** (2x2), **Vertikal** (untereinander) oder **Horizontal** (nebeneinander).

**Tastengröße:** wählen Sie unter **sehr klein**, **klein**, **mittel**, **groß** und **sehr groß**.

**Schriftgröße:** wählen Sie eine Schriftgröße zwischen 8 Pt und 32 Pt.

**Nach Auswahl Taste 1:** konfigurieren Sie das erste der 4 Tastenfelder. Wählen Sie  
Funktion, Bild, Text, Textfarbe und Tastenfarbe. Standardmäßig ist die Taste mit der  
Funktion „Linksklick“ belegt.

**Nach Auswahl Taste 2:** konfigurieren Sie das zweite der 4 Tastenfelder. Wählen Sie Funktion, Bild, Text, Textfarbe und Tastenfarbe. Standardmäßig ist die Taste mit der Funktion „Rechtsklick“ belegt.

**Nach Auswahl Taste 3:** konfigurieren Sie das dritte der 4 Tastenfelder. Wählen Sie Funktion, Bild, Text, Textfarbe und Tastenfarbe. Standardmäßig ist die Taste mit der Funktion „Doppelklick“ belegt.

**Nach Auswahl Taste 4:** konfigurieren Sie das vierte der 4 Tastenfelder. Wählen Sie Funktion, Bild, Text, Textfarbe und Tastenfarbe. Standardmäßig ist die Taste mit der Funktion „Klicken und Halten“ belegt.

### Windows-Tastatur automatisch ausblenden

Wenn aktiviert, wird die Windows-Bildschirmastatur nach Beendigung einer Eingabe automatisch ausgeblendet.

### Klicken in Windows



Einfügbare Funktionen: ◀KLICKEN-IN-WINDOWS-EIN▶ ◀KLICKEN-IN-WINDOWS-AUS▶ ◀KLICKEN-IN-WINDOWS-EIN/AUS▶

Ist die Funktion „Klicken in Windows“ eingeschaltet, können Sie durch Positionieren des Mauszeigers auch in Windows-Anwendungen die linke Maustaste auslösen („klicken“) bzw. eine von 4 Mausklick-Aktionen auswählen („Mausklick nach Auswahl“).

### Lupe für Mausclick

Einfügbare Funktionen: ◀KLICK-LUPE-EIN▶ ◀KLICK-LUPE-AUS▶ ◀KLICK-LUPE-EIN/AUS▶

Ist die Funktion „Lupe für Mausclick“ eingeschaltet, wird Ihnen zunächst ein vergrößerter Bildschirmausschnitt angezeigt, wenn Sie in einer Windows-Anwendung klicken. Sie können dann besser sehen und auswählen, an welcher Stelle genau der Mausclick erfolgen soll. Mit dem ersten „Klicken“ wählen Sie stets nur den Bereich aus, der vergrößert angezeigt werden soll. Klicken Sie dann im vergrößerten Bereich auf dem gewünschten Punkt.

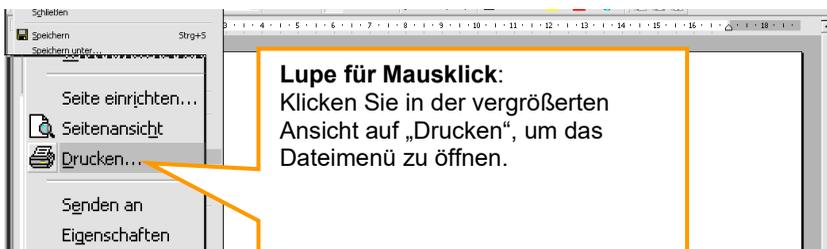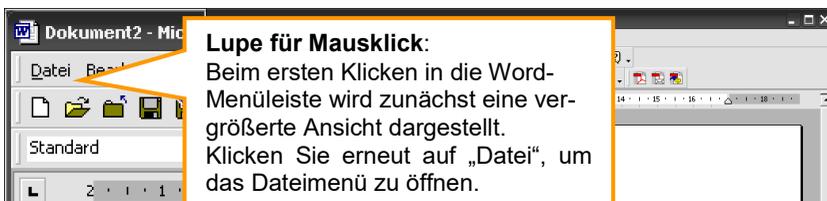

Bei Verwendung der Lupe verdoppelt sich die Zahl der notwendigen Mausklicks, da der erste Mausklick jeweils nur den ausgewählten Bereich vergrößert. Erst der zweite Mausklick löst die gewünschte Aktivität aus. Die Werte **Vergrößerung** sowie **zu vergrößernder Bereich** legen fest, welchen Ausschnitt die Kommunikationshilfe wie stark vergrößert.

### **Vergrößerung**

Wählen Sie den Vergrößerungsfaktor der Lupe. Zur Auswahl stehen 2-, 3-, 4- und 5-fache Vergrößerung.

### **Zu vergrößernder Bereich (Pixel)**

Wählen Sie, wie groß der zu vergrößernde Bildschirmausschnitt sein soll. Mögliche Werte sind 64 x 64 Pixel bis zu 256 x 256 Pixel. Je größer Ihr Vergrößerungsfaktor ist, desto weniger Pixel können vergrößert angezeigt werden.

Vergrößerung	2x	3x	4x	5x
Max. Größe	256x256	160x160	128x128	96x96

### **Windows-Tastatur vergrößern**

Wenn aktiviert, wird auch die Windows-Bildschirmtastatur vergrößert.

### **Windows-Ansteuerungsmethode**


Wählen Sie, wie Sie in Windows ausgewählte Displaypositionen bestätigen wollen. Mögliche Werte sind **identisch** (wie in NuVoice), **Auto** (wählen Sie eine abweichende Verweildauer) oder **Taste** (wählen Sie eine Drückdauer).

### **Windows-Auswahlbereich innen**

Hier können Sie einstellen, wie ruhig Sie den Mauszeiger positionieren müssen, um einen Mausklick an der aktuellen Position auszulösen. Der Innenbereich definiert den Bereich um das Ziel, der zu 100% gezählt / gewichtet wird. Kleinere Werte erfordern ein präziseres Positionieren des Mauszeigers. Mögliche Werte sind 2 - 32 Pixel. Ist „Mausklick nach Auswahl“ aktiviert, können Sie Innen- und Außenbereich nur synchron einstellen.

### **Windows-Auswahlbereich außen**

Haben Sie die Windows-Ansteuerungsmethode auf „Auto“ gestellt, können Sie hier einstellen, wie ruhig Sie den Mauszeiger positionieren müssen, um einen Mausklick an der aktuellen Position auszulösen. Der Außenbereich definiert den Bereich um das Ziel, der zu 50% gezählt / gewichtet wird. Kleinere Werte erfordern ein präziseres Positionieren des Mauszeigers. Mögliche Werte sind 2 - 32 Pixel. Ist „Mausklick nach Auswahl“ aktiviert, können Sie Innen- und Außenbereich nur synchron einstellen.

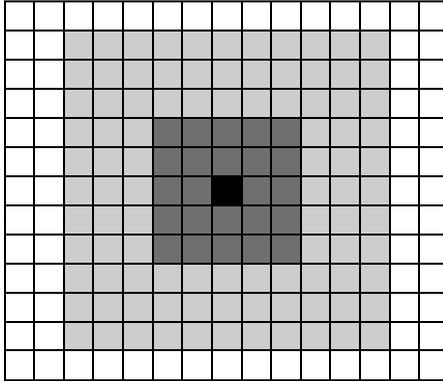

■ = Zielfeld

■ = Innenbereich (hier: 2 Pixel um das Zielfeld herum), Treffer zählt 100%


■ = Außenbereich (hier: 5 Pixel um das Zielfeld herum), Treffer zählt 50%

□ = nicht berücksichtigter Bereich, Treffer zählt nicht

## Reflektorpunkte verwenden

Zusammen mit Ihrer Kopfm Maus NuPoint haben Sie ein Packung mit 50 Reflektorpunkten erhalten.

Der Punkt reflektiert das von NuPoint ausgestrahlte Infrarotlicht und ermöglicht der eingebauten Kamera, Ihre Kopfbewegungen zu erfassen.

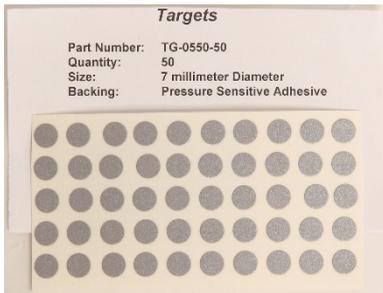

Wenn Sie einen neuen Reflektorpunkt benötigen, ziehen Sie ihn von der Folie ab und befestigen Sie ihn mittig auf dem Steg Ihrer Brille bzw. auf einem mittig auf der Stirn befestigten Pflaster.



Obwohl keine Unverträglichkeiten bekannt sind, sollten Sie den Reflektorpunkt nicht direkt auf die Haut kleben!



Weitere Reflektorpunkte sind bei PRD erhältlich.

# Positionierungs- und Einstellungsempfehlungen



NuPoint kann Ihre Kopfbewegungen auch in hellen Umgebungen präzise ermitteln.

## Positionierung

Je näher der Benutzer vor dem Accent sitzt, desto schneller wird der Mauszeiger den Kopfbewegungen folgen. Der optimal Abstand zur Ansteuerung mit NuPoint beträgt 45 bis 70 cm. Es wird empfohlen, dass der Benutzer so parallel wie möglich zum Bildschirm des Geräts sitzt.



Vermeiden Sie eine Positionierung des Benutzers vor Fenstern, reflektierenden Gegenständen und Gängen. Bewegungen hinter dem Benutzer könnten zu Reflektionen führen, die das System falsch interpretiert.

## Einstellungen

Diese Einstellungen funktionieren für die Mehrzahl der Benutzer. Variieren Sie einzelne Einstellungen, um die für Sie optimale Werte zu ermitteln.

Einstellung	Standard-einstellung	Empfohlene Einstellung
Selektion	AUTO	AUTO
Drückdauer	0,2 Sek	1,0 Sek
Ausgleichen/Mitteln	1	1
Horiz. Empfindlichkeit	5	1
Vertik. Empfindlichkeit	5	3
Reduzierte Selektion	AUS	AUS
Tastenwiederholung	AUS	AUS
Textfenster auslösen	EIN	EIN

## Absoluter und relativer Modus

Wenn Sie NuPoint in den absoluten Modus bringen, verringert sich die Notwendigkeit der Neuausrichtung des Systems, wenn Sie vom Gerät weggeschaut haben und die Maus am Bildschirmrand „stehen geblieben“ ist.

Der absolute Modus bietet somit Schutz vor absichtlichen oder versehentlichen Abweichungen zwischen Kopfrichtung und Mauszeigerposition, die eine Ansteuerung erschweren oder unmöglich machen können.

Der „absolute Modus“ steht als einfügbare Funktion zur Verfügung und muss zur Benutzung auf eine beliebige Taste gelegt werden. Die Funktion „relativer Modus“ zum Beenden des absoluten Modus sollte ebenfalls auf eine Taste gelegt werden.

### Der relative Modus

Ist der absolute Modus deaktiviert und NuPoint läuft im relativen Modus, muss der Benutzer sich jedesmal zum Mauszeiger neu ausrichten, sobald er den Mauszeiger mittels Kopfbewegung an den Bildschirmrand gebracht hat. Bewegt der Benutzer danach den Kopf zurück, sind Mauszeiger (der sich ja nicht weiterbewegt hat) und Kopf (der sich weiterbewegt hat) nicht mehr aufeinander ausgerichtet und der Benutzer muss sich neu ausrichten.

### Der absolute Modus

Der absolute Modus verhindert dass, der Kopf nach dem Verlassen des Bildschirmrandes neu zum Mauszeiger ausgerichtet werden muss. Dazu wird eine Art „Kalibrierung“ relativ zum Startpunkt der Benutzung kreiert. Der Talker arbeitet mit den so ermittelten Werten weiter, auch wenn der Benutzer den Mauszeiger bis an den Displayrand bewegt und danach den Kopf noch weiter bewegt hat. Der absolute Modus kann für Menschen mit zerebralen Bewegungsstörungen eine wertvolle Hilfe sein.

Im absoluten Modus kann man den Kopf nach links, rechts, oben oder unten bewegen und trotzdem bei der Rückkehr in den Erfassungsbereich der Kamera exakt wieder zum Mauszeiger ausgerichtet sein.

## Absoluten und relativen Modus verwenden


1. Legen Sie die einfügbaren Funktionen INTERNE KOPFMAUS ABSOLUTER MODUS und INTERNE KOPFMAUS RELATIVER MODUS auf 2 Felder (z. B. 2 benutzerprogrammierbare Tasten).
2. Schalten Sie den absoluten Modus ein, indem Sie die Taste INTERNE KOPFMAUS ABSOLUTER MODUS betätigen.
3. Schauen Sie möglichst ruhig auf die Bildschirmmitte.
4. Betätigen Sie die Taste INTERNE KOPFMAUS ABSOLUTER MODUS erneut. Der Benutzer ist nun auf die aktuelle Mauszeigerposition „kalibriert“.
5. Bewegen Sie den Mauszeiger bis zum Bildschirmrand und den Kopf darüber hinaus. Bewegen Sie den Kopf wieder zurück zur Bildschirmmitte. Der Mauszeiger sollte wieder ausgerichtet sein. Ohne den absoluten Modus wäre die Ausrichtung nach Erreichen des Bildschirmrandes verloren gegangen.
6. Schalten Sie den absoluten Modus aus, indem Sie die Taste INTERNE KOPFMAUS RELATIVER MODUS betätigen. NuPoint verhält sich jetzt wie eine normale Maus, d.h. bei Erreichen des Bildschirmrands geht die Ausrichtung verloren.

## Ansteuerung mit NuPoint pausieren / fortsetzen

Wollen Sie bei der Ansteuerung mit NuPoint eine Pause einlegen oder soll eine dritte Person Eingaben mit der Hand vornehmen, so können Sie die Ansteuerung mittels NuPoint pausieren lassen.

### Pausieren-Taste oberhalb des Displays

Blicken Sie oben in die Mitte des Bildschirms. Die grüne „Pausieren“-Taste wird angezeigt. Wählen Sie die Taste aus.

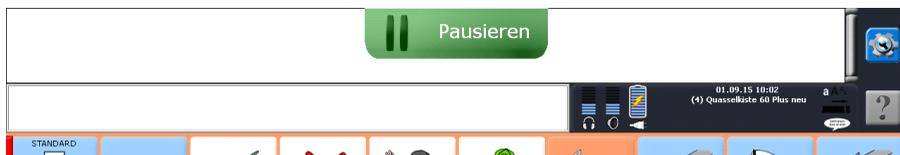

Die grüne „Pausieren“-Taste wird zur roten „Pausierend“-Taste. Die Ansteuerung mittels NuPoint ist jetzt deaktiviert..



Solange die Ansteuerung pausiert, können Sie in aller Ruhe die Oberfläche Ihres Accents studieren, ohne versehentlich Eingaben vorzunehmen, oder eine Dritte Person kann manuell Eingaben auf dem Touchscreen vornehmen.

### Einfügbare Funktion „Pausieren/Fortsetzen“

Wenn Sie nicht die „Pausieren“-Taste oberhalb des Displays verwenden wollen oder können, belegen Sie einfach eine Taste Ihrer Wahl mit der einfügbaren Funktion „Pausieren/Fortsetzen“ (zum Belegen von Tasten siehe NuVoice-Softwaremanual). Betätigen Sie diese Taste, um die Ansteuerung mittels NuPoint pausieren zu lassen. Betätigen Sie sie erneut, um die Ansteuerung mittels NuPoint fortzusetzen.

### NuPoint-Statusanzeige

Die LED auf der Vorderseite der Kopfmaus NuPoint leuchtet grün, wenn NuPoint arbeitet und Positionsdaten sendet.

Leuchtet die LED rot, bedeutet dies, dass NuPoint eingeschaltet ist, aber keine Positionsdaten sendet. NuPoint ist dann entweder im „Pausieren“-Modus oder erkennt keinen Reflektorpunkt.

# Index

## A

Anordnung 19  
Art der Hervorhebung 17  
Ausgleichen/Mitteln 14  
Auswahl hervorheben 16  
Automatische Selektion 14

## C

Cursor- und Indikatoreinstellungen 14  
Cursor zeigen 16  
Cursorfarbe 16  
Cursorgröße 16

## D

Drückdauer 14

## E

Einstellungen Mausclick nach Auswahl 19

## F

Füllfarbe (Hervorhebung) 17

## H

Hervorhebung 17  
Hervorhebung anpassen 16  
Hervorhebung, Art der 17  
Hinweisbalken, Breite 18  
Hinweisbalken, Farbe 18  
Hinweise 2  
Horiz. Empfindlichkeit 14  
Horizontal 19

## I

Implantierbare Medizinprodukte 8  
Indikator 16  
Indikatorfarbe 16  
Indikatorgröße 16  
Indikatormodus 16  
Indikatorrahmen 16  
Indikatortransparenz 16

Internes Windows 14

## J

Joystick 14

## K

Kasten 19  
Klicken in Windows 20  
Kopfmaus 14  
Kopfmaus montieren 12

## L

Lupe für Mausclick 20

## M

Manuelle Selektion 14  
Maus / Kopfmaus / Joystick 14  
Mausclick nach Auswahl 19  
Menü Hervorhebung 17

## N

Nach Auswahl Taste 1 19  
Nach Auswahl Taste 2 20  
Nach Auswahl Taste 3 20  
Nach Auswahl Taste 4 20  
NuPoint montieren 12

## R

Rahmenbreite (Hervorhebung) 17  
Rahmenfarbe (Hervorhebung) 17  
Reduzierte Selektion 15

## S

Schriftgröße 19  
Selektion automatisch/manuell 14  
Sicherheit 5  
Sicherheitshinweise 4

## **T**

Tasten außerhalb des Displays aktivieren  
18

Tastengröße 19

Tastenwiederholung 15

Textfenster auslösen 15

Trackstatus-LED 15

## **V**

Vergrößerung 21

Vertik. Empfindlichkeit 14

Vertikal 19

Virtuelle Tasten aktivieren 18

## **W**

Windows-Ansteuerungsmethode 21

Windows-Auswahlbereich außen 21

Windows-Auswahlbereich innen 21

Windows-Tastatur automatisch  
ausblenden 20

Windows-Tastatur vergrößern 21

## **Z**

Zu vergrößernder Bereich 21



Prentke Romich Deutschland  
Unterstützte Kommunikation

**Prentke Romich GmbH**

Karthäuserstr. 3  
D-34117 Kassel  
Tel. (0561) 78559-0  
Fax (0561) 78559-29  
E-Mail [info@prentke-romich.de](mailto:info@prentke-romich.de)  
Web [www.prentke-romich.de](http://www.prentke-romich.de)