



Bedienungsanleitung

Chat Software

100008v4



Prentke Romich Deutschland
Unterstützte Kommunikation

Hinweise

© Prentke Romich GmbH 2020-2021. Kommerzielle Nutzung und Weiterveräußerung verboten.
AeroSwitch, AeroText, Chat-Editor, ChatFusion, ChatPoint, NovaChat und RealizeLanguage sind Warenzeichen von PRC-Saltlillo.
Acapela Group, © 2020. Alle Rechte vorbehalten. Nutzung mit Genehmigung. Die Acapela Text-to-Speech-Technologie und die in der Software verwendeten synthetischen Stimmen dürfen nur zu Zwecken der Unterstützten Kommunikation verwendet und nicht veräußert, kopiert oder für kommerzielle Zwecke verwertet werden.
Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und werden von PRC-Saltlillo in Lizenz verwendet.
METACOM ist ein Warenzeichen von Annette Kitzinger.
Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation
Samsung, das Samsung-Logo und Galaxy Tab sind eingetragene Marken der Samsung Electronics.
The Picture Communication Symbols © 1981 - 2020 Tobii Dynavox. Weltweit alle Rechte vorbehalten. Nutzung mit Genehmigung. Boardmaker® ist ein Warenzeichen von Tobii Dynavox.
SymbolStix © 2020 SymbolStix, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Nutzung mit Genehmigung. Die in der Software enthaltene Bibliothek mit Buchstaben- und Logo-Symbolen darf nur zu Zwecken der Unterstützten Kommunikation verwendet und nicht veräußert, kopiert oder für kommerzielle Zwecke verwertet werden.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Chat-Editor ist Eigentum von PRC-Saltlillo.
„Microsoft Voices“ sind Eigentum der Microsoft Corporation.
Saltlillo erteilt die Berechtigung zur Nutzung des Chat-Editors auf jedem Computer, der zur Synchronisation / zum Datenaustausch mit dem NovaChat-Gerät verwendet wird.

Chat Bedienungsanleitung
Version 4 • August 2021

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden. Prentke Romich GmbH geht damit keinerlei Verpflichtung ein. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Prentke Romich GmbH sind die vollständige oder teilweise Fotokopie und Reproduktion dieses Handbuchs sowie die Übersetzung in andere Sprachen nicht zulässig.
Prentke Romich GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen für diese Unterlagen. Das gilt ohne Einschränkung auch für implizite Garantien auf Marktgängigkeit und Eignung dieses Geräts oder der hierin gemachten Angaben für einen bestimmten Zweck. Auch übernimmt die Prentke Romich GmbH über die gesetzliche Produkthaftung hinaus keine Haftung für irgendwelche Schäden, die sich aus der Anwendung und Nutzung dieses Geräts oder der in dieser Anleitung gemachten Angaben ergeben.

Hersteller	Der Bevollmächtigte in der EU	Importeur
	<div>EC</div> <div>REP</div>	
PRC-Saltlillo 1022 Heyl Road Wooster, OH 44691 U.S.A. Tel. +1 330 262-1984 Fax +1 330 262-4829 E-Mail info@prentrom.com Web prentrom.com	Prentke Romich GmbH Karthäuserstr. 3 D · 34117 Kassel Germany Tel. +49 (0) 561 7 85 59-0 Fax +49 (0) 561 7 85 59-29 E-Mail info@prentke-romich.de Web prentke-romich.de	Prentke Romich GmbH Karthäuserstr. 3 D · 34117 Kassel Germany Tel. +49 (0) 561 7 85 59-0 Fax +49 (0) 561 7 85 59-29 E-Mail info@prentke-romich.de Web prentke-romich.de

Dokumentenversion

100008v4 – 20.08.2021

Bezieht sich auf die Version 2.32 von Chat in Verbindung mit den Modellen NovaChat 5, NovaChat 8, NovaChat 10, NovaChat 12 und ChatFusion 10.

INHALTSVERZEICHNIS

Hinweise	2
ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DEN NOVACHAT	11
Willkommen beim NovaChat.....	12
Der Touchscreen-Bildschirm	13
Stylus verwenden.....	13
Über die in dieser Anleitung verwendeten Begriffe	14
Hinweis zu den hier verwendeten Abbildungen.....	14
Chat-Editor	15
Chat-Editor installieren.....	15
Chat-Editor starten	15
Hinweise zur Kompatibilität.....	16
Eingaben mitschneiden	17
Mitschnitt löschen	18
Mitschneiden deaktivieren	18
Mitschneiden beenden.....	18
Das Display.....	19
Das Menü öffnen.....	20
Position der Taste MENÜ auf dem Tablet.....	21
NovaChat 5, NovaChat 8, NovaChat 10 (ab 3. Generation) und NovaChat 12.....	21
ChatFusion.....	21
Untermenüs	22
Chat-Editor	23
Editiermodus	24
Chat beenden	25
VOKABULARE BEARBEITEN	27
Vorgespeichertes Vokabular laden	28
Neues Vokabular erstellen	29
Vokabular öffnen/wechseln	31
Vokabular duplizieren.....	33
Vokabular umbenennen.....	34
Vokabular eine Geste zuweisen	35
Vokabular löschen	38
Einzelnes Vokabular löschen	38
Mehrere Vokabulare auf einmal löschen.....	39
SEITEN BEARBEITEN	41
Seite erzeugen	42
Neue Seite anlegen.....	42
Seite duplizieren.....	44
Seite als Vorlage speichern.....	46
Seite von Vorlage anlegen.....	48
Seiteneigenschaften bearbeiten.....	50
Seite verknüpfen.....	53
Dauerhaft auf eine andere Seite wechseln	53
Für eine Auswahl auf eine andere Seite wechseln.....	54
Seitennavigationsbefehle	55
Situationsbilder	56
Situationsbild verwenden.....	56

Seite importieren	60
Seite kopieren	62
Startseite festlegen	63
Seite eine Geste zuweisen	65
Seite ein individuelles Scan-Muster zuweisen	68
Gruppen und Untergruppen erzeugen.....	70
Name und Scan-Muster einer Gruppe / Untergruppe bearbeiten	71
Untergruppe hinzufügen	72
Untergruppen automatisch hinzufügen.....	73
Alle Untergruppen automatisch hinzufügen	73
Untergruppe löschen.....	73
Gruppe und Untergruppen löschen	74
Eigenes Scan-Muster entwerfen	74
Eigenes Scan-Muster als Standard-Scan-Muster verwenden	76
Seiten löschen.....	77
Einzelne Seite löschen	77
Mehrere Seiten löschen.....	78
TASTEN BEARBEITEN	81
Taste bearbeiten	82
Tasteneigenschaften – Allgemein	83
Name.....	83
Label	83
Mitteilung.....	83
Symbol / Bild	84
Nächste	85
Label	86
Mitteilung	86
Name bearbeiten.....	86
Bild.....	87
Sichtbar.....	93
Tasteneigenschaften – Layout	94
Schrift	94
Fett, Kursiv, Unterstrichen	94
Transparenz	94
Label oben.....	95
Sichtbar.....	95
Hintergrundfarbe.....	95
Schriftfarbe	95
Rahmenfarbe.....	95
Rahmenbreite.....	95
Schrift	96
Fett, Kursiv, Unterstrichen	96
Farbe – Fläche	96
Farbe – Schrift.....	97
Farbe – Rahmenfarbe	97
Rahmenbreite.....	97
Transparenz	97
Label oben.....	97
Tasteneigenschaften – Funktion	98
Übersicht Tasten- & Gestenfunktionen.....	100
Tastenmakro (mehrere Funktionen ausführen).....	104
Taste mehrfach verwenden	106
Taste aus Bibliothek laden	106

Taste kopieren	108
Taste verknüpfen	110
Tastenlayout übertragen.....	112
Tastengröße ändern	114
Taste entfernen.....	116
Multi-Taste.....	117
Multi-Taste benutzen	117
Multi-Taste benutzen	118
Multi-Taste erstellen	119
Multi-Taste aus Bibliothek laden	121
Multi-Taste kopieren	123
Multi-Taste verknüpfen	125
Multi-Taste bearbeiten.....	127
Sound wiedergeben	129
Aufnahme machen	130
Aufnahme machen	132
Sound aufnehmen.....	133
Aufnahme machen	136
Audio- und Videodateien wiedergeben.....	137
Audiodatei einer Taste zuweisen	137
Wiedergabe einer Audiodatei beenden	137
Videodatei einer Taste zuweisen.....	137
Wortsuche.....	138
Wortsuche als Tastenfunktion.....	138
Wortsuche mittels Menü	138
Android-Anwendung öffnen.....	140
Grammatikfunktionen	141
Wort abwandeln	141
Nächstes Wort abwandeln	141
Wortart zuweisen	141
Dynamische Labels	142
Übersicht Beugungsmöglichkeiten	142
Tasten anzeigen/verbergen	146
VORGABEN	151
Vorgaben	152
Vokabularvorgaben	153
Seitenvorgaben	155
Tastenvorgaben	158
TEXTFENSTER	161
Das Textfenster.....	162
Text auf Taste speichern	163
Textfenster speichern	164
Textfenster laden.....	165
Textfenster – Text kopieren	166
Textfenster – Text einfügen.....	166
Textfenster – Text teilen	166
EINSTELLUNGEN	167
Ansteuerung	169
Alternative Ansteuerung.....	169
Verzögerungszeiten	169
Drückdauer	169
Loslassdauer.....	169
Beim Loslassen aktivieren	169

Scanning	169
Scanning aktivieren	170
Ansteuerung mit Tasten	170
Muster	171
Scangeschwindigkeit	174
Visuelle Effekte	176
Rahmen	176
Rahmenfarbe	176
Rahmenbreite	176
Durchscheinende Markierung	177
Transparenz der Markierung	177
Farbe der Markierung	177
Farben invertieren	177
Vergrößern	177
Vergrößerungsfaktor	178
Animierung	178
Ansagen	178
Drücken & Finden	179
Gesten	179
Tastatur	180
Neigen	180
Aktion	180
Bevorzugte Ausrichtung	180
Tastenpiepton	180
Tastendruck	180
Verborgene Tasten anzeigen	180
Textfenster	181
Tippen = Sprechen	181
Tippen = Maximieren	181
Menü aktivieren	181
Feld ‚Löschen‘ (X) einblenden	181
Benachrichtungszeile anzeigen	181
Kopfmaus (Headpointer)	181
Kopfmaus aktivieren	182
Verweildauer	182
Horizontale Empfindlichkeit	182
Vertikale Empfindlichkeit	182
Visuelle Effekte	183
Steuerfelder anzeigen	183
Ruhezone	185
Erweitert	185
Sprachausgabe	188
Sprachsynthese	188
Synthsizer	188
Stimme	188
Aussprache	188
Pause zwischen Wörtern	189
Zeichen sprechen	190
Wort sprechen	190
Satz sprechen	190
Textfenster automatisch löschen	190
Sprachausgabe aus	190
Zweites Textfenster	191
Textbausteine	192

Einen Textbaustein hinzufügen	193
Einen Textbaustein bearbeiten	194
Einen Textbaustein löschen	195
Schreibhilfen.....	196
Wortvorhersage.....	196
Art der Wortvorhersage wählen.....	197
Lexikon wählen	197
Wort hinzufügen.....	198
Überprüfung erforderlich	198
Wörter überprüfen	198
Gespernte Wörter	199
Wörter importieren	199
Gelernte Wörter löschen	200
Wortvorschlagsfelder definieren.....	202
Automatische Großschreibung	202
Dynamische Labels.....	203
Mitteilung einblenden	203
Mitteilung anzeigen:	203
Ganzer Bildschirm:	203
Geschwindigkeit:	204
Automatisch beenden:	204
Dauer:	204
Layout.....	205
Textfenster.....	205
Schrift.....	205
Textfenstergröße.....	206
Hintergrundfarbe	206
Textfarbe	206
Symbole anzeigen.....	206
Oben	206
Bilder	206
Symbole anzeigen.....	206
Füllen.....	206
Sprungindikator.....	207
Größe.....	207
Farbverlauf.....	207
Farbverlauf.....	207
Sättigung	207
Seiten-Animationen.....	207
Alle animieren.....	207
Weitere Optionen	208
Raster anzeigen	208
Fingerführungsgitter verwenden	208
Menü-Taste.....	208
Wortsuche.....	210
Im Menü anzeigen	210
Anzeige-Intervall	210
Menüsperr	211
Menüsperr.....	211
Passwort wählen.....	211
Menüsperr einschalten.....	212
Menüsperr ausschalten.....	212
Passwort für Menüsperr ändern.....	213
Profile.....	214

Neues Profil erstellen.....	214
Profil speichern.....	216
Profil laden.....	218
Standardprofil laden	220
Profil löschen	222
Sprache.....	224
Sprache wechseln	224
System.....	226
Bluetooth / Lautsprecher & Telefon.....	227
Externen Verstärker benutzen	227
Mit Verstärker verbinden.....	227
Nutzung mit externem Telefon.....	227
Mit Telefon verbinden.....	227
Mit Taste verbinden.....	228
Rückmeldungen / Feedback	228
Auslösepiepton.....	228
Vibrieren.....	228
Display / Energie	228
Helligkeit	228
Bildschirm ausschalten.....	229
Zeit und Datum	229
Datum einstellen	229
Zeitzone einstellen	229
Zeit einstellen.....	229
24-h-Format	229
Datumsformat einstellen.....	230
Batterie- und Ladezustand.....	230
Kiosk-Modus.....	230
Kios-Modus.....	230
Passwortschutz.....	231
Geräte-Lautstärketasten deaktivieren.....	231
Anonyme Nutzungsdaten teilen	231
Daten zurücksetzen.....	231
Sprachdatenaufzeichnung.....	232
Sprachdatenaufzeichnung.....	232
RealizeLanguage™	232
Gerät mit Konto verknüpfen	232
Benutzer.....	233
Auto-Upload	233
Jetzt hochladen.....	233
Aufgezeichnete Daten in Datei speichern.....	233
Aufgezeichnete Daten löschen	234
Passwort für aufgezeichnete Daten setzen.....	234
Passwort setzen	234
Passwort ändern	234
SENDEN UND EMPFANGEN VON TEXTNACHRICHTEN (SMS)	235
Textnachrichten (SMS) mit den NovaChat/ChatFusion versenden und empfangen.....	236
AeroText installieren	236
AeroText konfigurieren.....	237
AeroText zur Standardnachrichten-App machen.....	237
Bluetooth Berechtigungsanfrage.....	237
Smartphoneunterstützung auf dem NovaChat / ChatFusion aktivieren	238
Fehlermeldung „Konnte nicht mit dem Telefon verbinden“.....	238

Nachrichten (SMS) senden und empfangen	239
Zur Nutzung der Nachrichtenfunktionalität	239
SMS – Seite Unterhaltungen	240
SMS – Seite Nachrichten	241
SMS – Seite Nachrichtendetails	242
SMS – Seite Kontakte	242
SMS-Seiten zu Spezialseiten machen	243
Liste der Tastenfunktionen zur Nutzung von SMS	246
Erläuterung der SMS-Symbole im Textfenster	247
SICHERN & WIEDERHERSTELLEN	249
Vokabulare sichern und übertragen	250
Vokabulare sichern und wiederherstellen über USB	250
Vokabulare sichern und wiederherstellen über PC	254
Vokabular vom Chat-Editor auf den NovaChat übertragen	254
Vokabular vom NovaChat-Gerät zum Chat-Editor übertragen	255
Vokabular vom Chat-Editor als Datei exportieren	256
Vokabulardatei in den Chat-Editor importieren	257
Bibliothek	258
Bibliothek sichern	258
Bibliothek wiederherstellen	260
Seiten drucken	262
SOFTWARE-UPDATE	263
Software-Update	264
Internetzugang einrichten	264
Chat-Editor	264
NovaChat-Gerät	264
Auf Aktualisierung prüfen	264
Chat-Editor	264
NovaChat-Gerät	265
Automatische Updates auf dem NovaChat-Gerät deaktivieren	267
FEHLERSUCHE & PANNENHILFE	269
Der NovaChat spricht nicht mehr	270
Benutzervokabular ist verschwunden	270
Der NovaChat reagiert nicht	270
Das Textfenster wird nicht angezeigt	270
Der NovaChat schaltet sich selber aus	270
Das Display ist zu dunkel	270
Die Displayhelligkeit schwankt ständig	270
Die Tastenfelder lassen sich nicht auslösen	270
Ein Bild füllt die Taste nicht aus	271
Bei (<i>Name des Vokabulars</i>) handelt es sich um eine Originaldatei, die nicht verändert werden kann	271
NovaChat zeigt englische Menüs an	271
INDEX	273

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DEN NOVAChat

Willkommen beim NovaChat

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb einer NovaChat-Kommunikationshilfe bzw. eines ChatFusions mit dynamischen Display und Sprachausgabe.

Die NovaChat-Geräte und der ChatFusion verbinden die Haltbarkeit und Portabilität eines modernen Tablet-Computers mit der Leistungsfähigkeit der *Chat*-Software von Saltillo und den Wortschatzprogrammen von PRD. Durch ihr geringes Gewicht und ihre kompakten Abmessungen sind die Kommunikationshilfen optimal für mobile Benutzer*innen geeignet.

NovaChat und ChatFusion verfügen sowohl über digitalisierte (natürliche) Sprache als auch synthetische Sprache (computergenerierte Sprache). Das Gerät ermöglicht das Abrufen von Sätzen, Phrasen, Wörtern sowie das Buchstabieren von Aussagen in Verbindung mit einer lernfähigen Wortvorhersage. Die Ansteuerung kann direkt auf den Display erfolgen oder über 1 oder 2 Tasten im so genannten Scanningbetrieb. Der ChatFusion bietet darüber hinaus noch die Möglichkeit der berührungslosen Ansteuerung nur mittels Kopfbewegungen über die interne Kopfmaus *ChatPoint*.

Für NovaChat und ChatFusion steht die PC-Software *Chat-Editor* kostenlos als Download zur Verfügung, mit deren Hilfe Sie bequem alle Änderungen am Vokabular vornehmen können, um diese dann zu einem beliebigen Zeitpunkt in das Gerät zu übertragen. Sie können Änderungen jedoch auch direkt auf dem Gerät durchführen.

Das Übertragen von Vokabulardateien zwischen PC und NovaChat bzw. ChatFusion erfolgt bequem über den im Lieferumfang enthaltenen USB-Stick oder bei Benutzung des Chat-Editors über das mitgelieferte USB-Sync-Kabel.

Zum Kennenlernen des Geräts lesen Sie bitte ebenfalls das Hardware-Manual durch.

Um auch später noch darin nachschlagen zu können, bewahren Sie die Bedienungsanleitung bitte auf.

Der Touchscreen-Bildschirm



Sicherheitshinweis: Im NovaChat-Gerät ist ein Flüssigkristalldisplay (LCD, Liquid Crystal Display) eingebaut. Sollte das Display jemals zerbrechen und Sie in Kontakt mit den Flüssigkristallen kommen, spülen Sie die Kristalle unter fließendem Wasser ab und waschen Sie die betroffenen Hautstellen gründlich.



Sicherheitshinweis: Das Display besteht aus Glas. Sollte das Display jemals zerbrechen, schützen Sie sich vor Glassplittern!



Hinweis: Benutzen Sie für Eingaben auf dem Touchscreen keine scharfen oder spitzen Gegenstände. Diese könnten die Oberfläche beschädigen. Obwohl Sie Eingaben mit den Fingern machen können, empfehlen wir zur Verwendung der Menüs auf dem NovaChat die Benutzung des mitgelieferten Stylus.

Stylus verwenden

Der NovaChat wird mit einem Bedienstift (Stylus) geliefert. Falls Sie den NovaChat nicht mit den Fingern bedienen wollen oder können, können Sie den Stift verwenden, um Eingaben vorzunehmen.



Der Stift verfügt über eine Öffnung am oberen Ende, so dass Sie ihn mit einem Band oder Lanyard am NovaChat-Gerät befestigen können.

Über die in dieser Anleitung verwendeten Begriffe

Eine **Vokabulardatei** besteht aus einer oder mehreren Seiten. Eine **Seite** besteht aus einer oder mehreren Tasten. Eine **Taste** kann Text oder ein Bild enthalten oder beides. Die Anzahl der Tasten einer Seite sowie ihre jeweilige Gestalt sind individuell wählbar.

Normale Tasten haben eine Belegung, Multi-Tasten können bis zu 50 unterschiedliche Belegungen haben, die über sogenannte Modifizierer ausgewählt werden.

Die Belegung einer Taste kann die Ausgabe einer Mitteilung sein, der Sprung zu einer anderen Seite, eine Gerätefunktion wie „Display löschen“ oder eine Kombination davon.

Um eine Taste auszuwählen, ist sie einfach auf dem Display zu drücken oder per Scanning anzusteuern.

Ressource und **Bibliothek** sind Begriffe, die die Gesamtheit aller Vokabulare inkl. ihrer Seiten, Tasten, Bilder und Audiodateien bezeichnen. Die **Standardbibliothek** ist der von PRD angefertigte Satz von Vokabulardateien, Bildern und Audiodateien, mit dem der NovaChat ausgeliefert wird.

Der Begriff **Editiermodus** bezeichnet die Betriebsart, in der Sie das Vokabular bearbeiten können. Befindet sich das NovaChat-Gerät bzw. der Chat-Editor im Editiermodus, so wird dies in großen roten Buchstaben unten links im Display des NovaChats bzw. im Chat-Editor in der Titelleiste angezeigt. Weiterhin werden der Name des aktuell geladenen Vokabulars sowie der Name der gerade angezeigten Seite angezeigt.

Auch im Editiermodus lassen sich alle Felder ganz normal benutzen. Um die Belegung einer Taste zu ändern, klicken Sie im Chat-Editor mit der rechten Maustaste auf die Taste. Auf dem NovaChat tippen Sie ca. für 1 Sekunde auf die zu bearbeitende Taste, bis sich das Kontextmenü öffnet.

Für die Benutzung des NovaChats sollte der Editiermodus deaktiviert werden!

Das **Textfenster** bezeichnet den in der Größe einstellbaren Bereich oberhalb bzw. unterhalb der aktuellen Seite, in dem alle abgerufenen Aussagen gesammelt werden.

Eine **Geste** bezeichnet eine Eingabe mit einem oder mehreren Fingern, die zusätzlich eine Zeitinformation (Tippen, Halten) oder eine Richtung (Wischen) beinhaltet.

Alle für den **NovaChat** gemachten Angaben gelten auch für den **ChatFusion**.

Hinweis zu den hier verwendeten Abbildungen

Je nachdem, welches NovaChat- bzw. ChatFusion-Gerät (Hardware, Softwareversion, Androidversion) Sie verwenden, werden Menüs und Meldungen leicht unterschiedlich angezeigt. Die hier gemachten Abbildungen der Gerätesoftware sind daher nicht als verbindlich anzusehen und können von der Ansicht Ihres Gerätes abweichen.

Chat-Editor

Für den NovaChat bzw. den ChatFusion steht die Software Chat-Editor für Windows zur Verfügung, die Sie kostenlos von der PRD-Homepage herunterladen können. Installieren Sie das Programm auf Ihrem Computer, um Benutzervokabulare anzulegen, zu bearbeiten und zu speichern.

Chat-Editor in der Übersicht

- Entwerfen und testen Sie Vokabulardateien direkt auf Ihrem PC.
- Legen Sie Sicherheitskopien Ihrer Vokabulare an.
- Übertragen Sie Vokabulare zwischen PC und NovaChat-Gerät.
- Importieren Sie Fotos und Bilder in den NovaChat.
- Verwalten und unterstützen Sie mehrere NovaChat-Benutzer.

Diese Anleitung wird Sie mit dem Programm Chat-Editor vertraut machen. Alle Angaben gelten jedoch ebenfalls für das auf dem NovaChat-Gerät laufende Programm *Chat*. Bedingt durch unterschiedliche Betriebssysteme (Windows bzw. Android) ist die Benutzeroberfläche jedoch unterschiedlich.



Hinweis: Es wird empfohlen, stets eine Sicherheitskopie des aktuell im NovaChat-Gerät verwendeten Vokabulars anzufertigen. Im Falle eines Datenverlustes auf dem NovaChat-Gerät können Sie damit den vorigen Zustand schnell wieder herstellen (siehe S. 31).


Chat-Editor installieren

- Laden Sie den Chat-Editor-Installer von der PRD-Homepage herunter
- Doppelklicken Sie auf der heruntergeladenen Datei, um die Installation zu beginnen.
- Wählen Sie die zu installierenden Programme.
- Wählen Sie **Installieren**.
- Folgen Sie den Angaben auf dem Bildschirm.


Chat-Editor starten

- Starten Sie das Programm durch Doppelklicken auf der Verknüpfung, die auf Ihrem Desktop angelegt worden ist.
- Wählen Sie *Bibliothek – Vorgespeicherte Vokabulare* und wählen Sie ein Vokabular aus.

Der Chat-Editor ist nun bereit für die Benutzung.

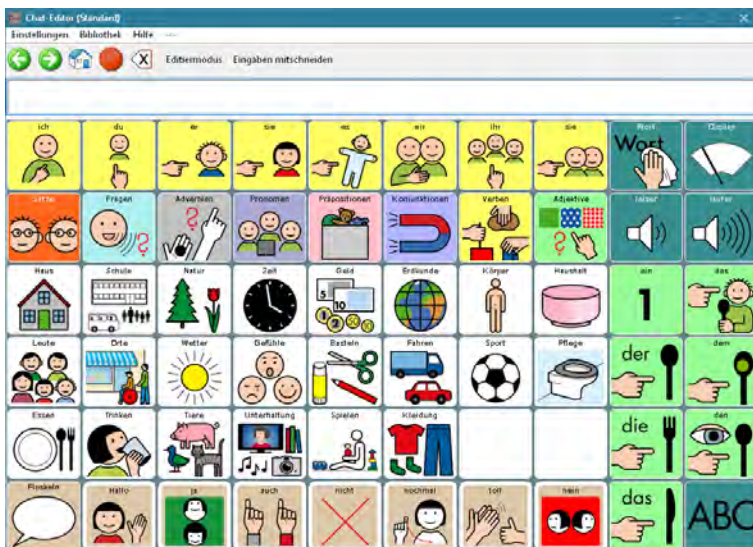

Der Chat-Editor lässt sich in der Größe auf das von Ihnen benutzte Gerät einstellen. Wählen Sie *Einstellungen – Anzeigeformat*, um die unterstützten Geräte angezeigt zu bekommen. Wählen Sie die zu Ihrem Gerät und zur bevorzugten Ausrichtung (Hochformat bzw. Querformat) passende Anzeige. Sie sehen dann das Deckblatt ungefähr in der Größe, wie es auf dem Gerät angezeigt wird.

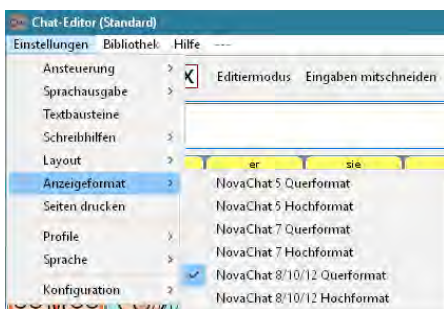


Hinweise zur Kompatibilität

Der Chat-Editor ist der Nachfolger des NovaChat-Editors und unterstützt mehrere Plattformen (NovaChat, TouchChat). Der Chat-Editor ist zur NovaChat-Software ab V2.0 kompatibel. Vokabulare, die mit dem NovaChat-Editor oder auf NovaChats mit V1.x-Software angefertigt wurden, werden beim Öffnen mit dem Chat-Editor automatisch in das neue Format konvertiert. **Nach dem Konvertieren können diese Vokabulare weder in einen NovaChat mit V1.x-Software noch in den NovaChat-Editor geladen werden!**


Eingaben mitschneiden

Zum Erstellen von didaktischen Materialien, die die Symbolsequenzen der abgerufenen Aussagen zeigen, ermöglicht der Chat-Editor das Aufzeichnen von Eingaben.


Klicken Sie auf „Eingaben mitschneiden“.

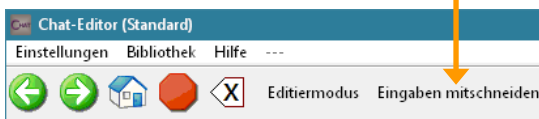

Das Fenster „Mitschnitt“ öffnet sich unterhalb des Editors:

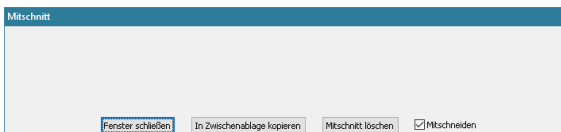

Rufen Sie die gewünschte Aussage ab. Alle zugehörigen Symbole erscheinen im Fenster „Mitschnitt“.

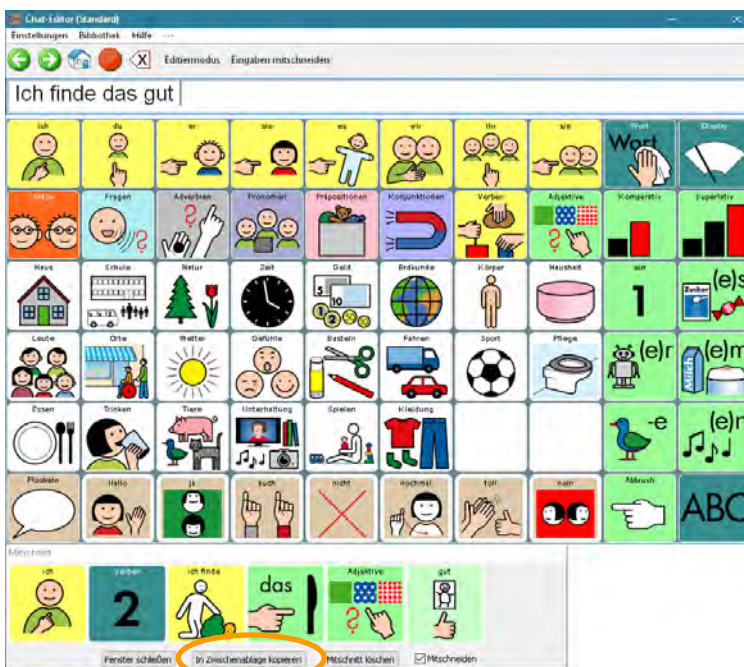

Klicken Sie auf „In Zwischenablage kopieren“, um den aktuellen Inhalt des Mitschnittsfensters in die Windows-Zwischenablage zu kopieren.

Wechseln Sie zu Ihrem Textverarbeitungsprogramm und wählen Sie „Einfügen“ oder drücken Sie Strg + V. Der Mitschnitt wird als Grafik eingefügt.



Das Fenster „Mitschnitt“ ist nun wieder leer. Fahren Sie mit dem Abrufen von gespeicherten Aussagen fort, um weitere Symbolsequenzen zu generieren.

Mitschnitt löschen


Befinden sich Symbole im Fenster „Mitschnitt“, die Sie nicht benötigen, so klicken Sie auf „Mitschnitt löschen“.



Das Fenster „Mitschnitt“ ist danach wieder leer.

Mitschneiden deaktivieren


Wollen Sie bestimmte Symbole aus der Grafik ausschließen, entfernen Sie den Haken bei „Mitschneiden“.

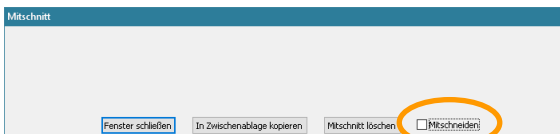

Klicken Sie dann auf die Symbole, die Sie ausschließen wollen. Setzen Sie nun den Haken bei „Mitschneiden“ wieder. Fahren Sie mit der Eingabe von Symbolen fort.

Mitschneiden beenden


Klicken Sie auf „Fenster schließen“, um das Mitschneiden zu beenden.

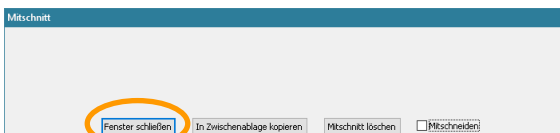

Das Display

Das Display ist beim NovaChat 5, NovaChat 8, NovaChat 10 der 3., 4., 5. und 6. Generation sowie beim NovaChat 12 in zwei Bereiche unterteilt. Beim NovaChat 7, NovaChat 10 der 1. und 2. Generation sowie beim ChatFusion ist das Display in drei Bereiche unterteilt.

NovaChat 5 / NovaChat 8 / NovaChat 10 (3.-6. Generation) / NovaChat 12:

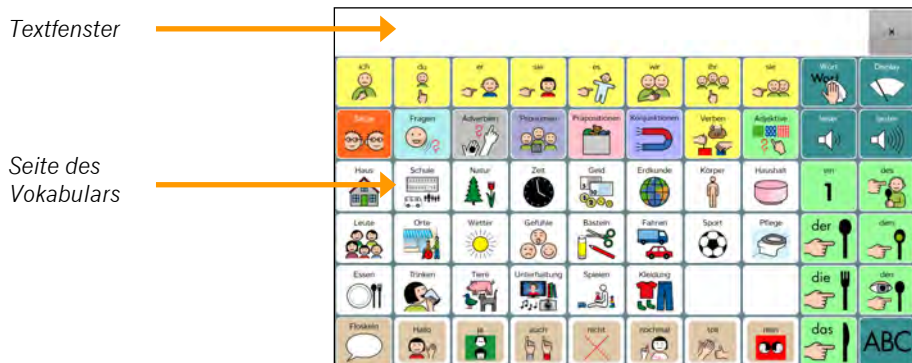

NovaChat 7 / NovaChat 10 (1. und 2. Generation) / ChatFusion:



Oben befindet sich das Textfenster. Alle abgerufenen Mitteilungen erscheinen dort in Textform. Größe des Textfensters, Schriftart, -größe und -farbe können individuell eingestellt werden. Das Textfenster kann optional unten eingeblendet werden.

In der Mitte sehen Sie die aktuelle Seite des geladenen Vokabulars.


Beim NovaChat 7, NovaChat 10 der ersten und zweiten Generation und beim ChatFusion wird zusätzlich unten die Statusleiste angezeigt.


Das Menü öffnen

Ab der Version 2.28 der Software Chat gibt es mehrere Möglichkeiten, das Hauptmenü zu öffnen (siehe Seite 208 für die Optione zur Menü-Taste).

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  des Tablets.
- Tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  des Tablets.
- Sie können links im Textfenster eine Taste  anzeigen lassen, die das Hauptmenü öffnet.




- Sie können eine Menü-Leiste anzeigen lassen, die links eine Taste  enthält, die das Hauptmenü öffnet.

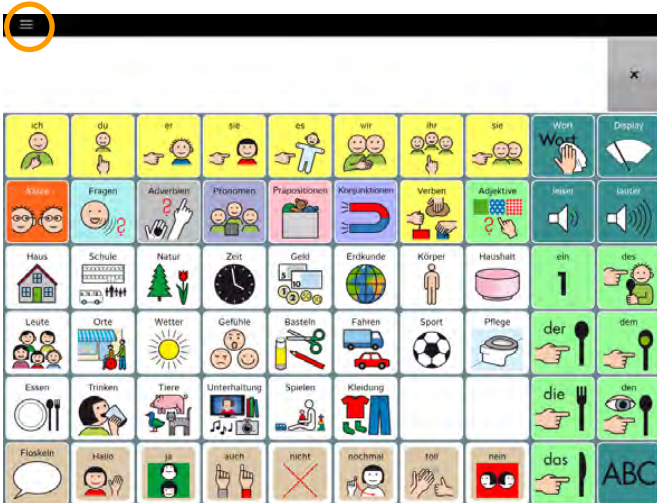

Position der Taste MENÜ auf dem Tablet

NovaChat 5, NovaChat 8, NovaChat 10 (ab 3. Generation) und NovaChat 12

- Beim NovaChat 5, NovaChat 8, NovaChat 10 (3. Generation) und NovaChat 12 befindet sich die Taste **MENÜ** unterhalb des Home-Buttons des Tablets:

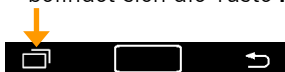


ChatFusion

- Beim ChatFusion befindet sich die Taste **MENÜ** rechts von der Taste HOME im Display:



Tippen Sie auf die Taste **MENÜ** auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.

Es öffnet sich jeweils das Hauptmenü mit den Menüpunkten *Editiermodus*, *Einstellungen*, *Bibliothek*, *Hilfe*, *Wortsuche* (sofern aktiviert), *Sperren* (sofern aktiviert) und *Beenden*.

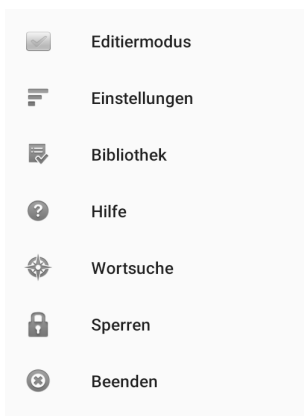

Schalten Sie den **Editiermodus** ein, um das aktuelle Vokabular direkt auf dem Gerät bearbeiten zu können.

Unter **Einstellungen** können Sie Einstellungen vornehmen in den Bereichen *Ansteuerung*, *Sprachausgabe*, *Textbausteine*, *Schreibhilfen*, *Layout*, *Wortsuche*, *Menüsperre*, *Profile*, *Sprache*, *System* und *Sprachdatenaufzeichnung*. Die einzelnen Optionen werden hier im Handbuch beschrieben.

Unter **Bibliothek** haben Sie Zugang zu den auf dem Gerät gespeicherten Vokabularen.

Der Menüpunkt **Hilfe** gibt Informationen über die Geräte-ID des NovaChats, die installierte Software, vorhandene Symbolsammlungen und Sprachsynthesen. Wei-

terhin können Sie hier einen neuen Registrierungsschlüssel eingeben, um weitere Features freizuschalten, sowie Online-Softwareupdates durchführen.

Die **Wortsuche** erlaubt adas Suchen eine Worrttes im Vokabular.Sie können wählen, ob die Wortsuche in diesem Menü angezeigt wird oder nicht.




Mittels **Sperren** können Sie das Anzeigen des Menüs verhindern. Zum Entsperren wird ein Passwort benötigt. Diese Option wird nur angeboten, wenn die Menüsperre aktiviert und ein Passwort vergeben wurde.

Zum **Beenden** der Chat Anwendung wählen Sie Beenden.

Tippen Sie auf die Taste **zurück** , um ein Menü wieder zu schließen.


Untermenüs

Viele Menüs haben ein Untermenü. Sie öffnen ein Untermenü, indem Sie im geöffneten Menü

- auf die Taste MENÜ  tippen oder
- die Taste ZURÜCK  tippen und halten oder
- oben rechts in der Status-Leiste auf die Taste MENÜ  tippen.


Chat-Editor

Der Chat-Editor bietet die Menüpunkte „Einstellungen“, „Bibliothek“, „Hilfe“ sowie die Betriebsarten „Editiermodus“ und „Eingaben mitschneiden“.

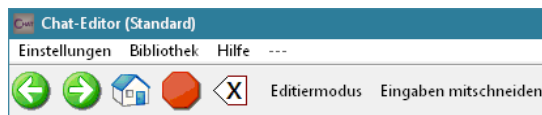


Optionen des Menüs

Einstellungen: *Bibliothek:*

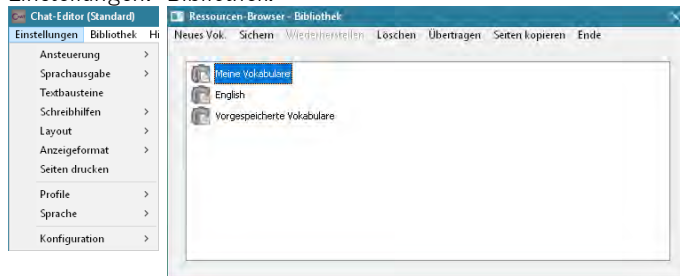

Hilfe:

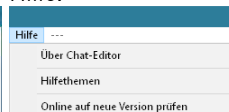


Schalten Sie den **Editiermodus** ein, um das aktuelle Vokabular im Editor bearbeiten zu können.

Unter **Einstellungen** können Sie Einstellungen vornehmen in den Bereichen *Ansteuerung*, *Sprachausgabe*, *Textbausteine*, *Schreibhilfen*, *Layout*, *Anzeigeformat*, *Profil*, *Sprache* und *Konfiguration*. Die einzelnen Optionen werden hier im Handbuch beschrieben.

Unter **Bibliothek** haben Sie Zugang zu allen im Editor gespeicherten Vokabularen. Der Menüpunkt **Hilfe** gibt Informationen über die installierte Software sowie vorhandene Symbolsammlungen. Weiterhin können Sie hier neue Registrierungsdaten eingeben, um weitere Features freizuschalten.

Navigationstasten

Die Navigationstasten unterhalb der Menüleiste des Chat-Editors ermöglichen schnelles Navigieren zur **vorigen Seite**, zur **nächsten Seite** und zur **Startseite**.

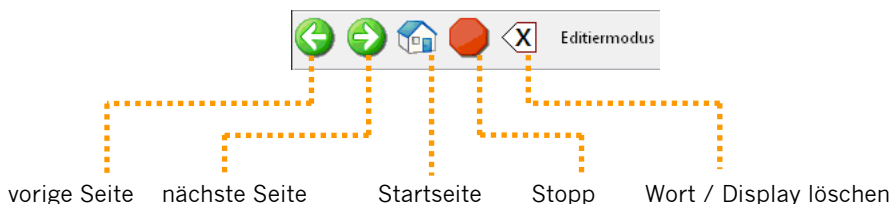

Die **Stopp**-Taste kann benutzt werden, um die Sprachausgabe abubrechen.

Editiermodus

Chat-Editor

Um ein Vokabular zu bearbeiten, muss der Chat-Editor in den Editiermodus umgeschaltet werden.

- Wählen Sie **Editiermodus**:




- Die Felder werden mit einem roten Raster umgeben.
- Oben in der Fensterleiste werden der Hinweis „Editiermodus“ sowie der Name des aktuellen Vokabulars und der angezeigten Seite angezeigt:



NovaChat-Gerät

Um ein Vokabular zu bearbeiten, muss das NovaChat-Gerät in den Editiermodus umgeschaltet werden.

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.

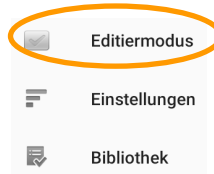




- Wählen Sie die Option **Editiermodus**.
- Unten links wird der Hinweis „Editiermodus“ sowie Name des aktuellen Vokabulars und der angezeigten Seite angezeigt.



Chat beenden

Sie können Chat-Anwendung beenden, um auf den Android-Homescreen zuzugreifen

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wählen Sie die Option **Beenden**

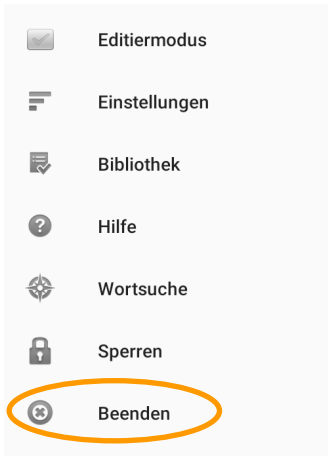


Hinweis: Ist der NovaChat/ChatFusion als geschlossene Anlage konfiguriert oder ist der Kiosk-Modus aktiviert, steht die Option „Beenden“ nicht zur Verfügung.

VOKABULARE BEARBEITEN

Vorgespeichertes Vokabular laden


Chat-Editor

- Wählen Sie Bibliothek – Vorgespeicherte Vokabulare.
- Wählen Sie eine Gruppe aus.
- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das gewünschte Vokabular.
- Wählen Sie **Duplizieren**, um eine editierbare Kopie des Vokabulars zu erzeugen. Geben Sie einen Namen für das neue Vokabular ein.

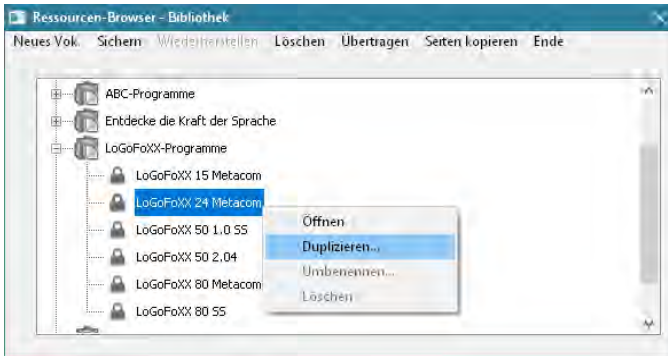


NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.

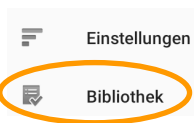

- Wählen Sie die Option **Bibliothek**.
- Die auf dem Gerät vorhandenen Vokabulare werden angezeigt.
- Tippen Sie auf das gewünschte Vokabular.
- Wählen Sie die Option **Duplizieren**, um eine editierbare Kopie des Vokabulars zu erzeugen. Geben Sie einen Namen für das neue Vokabular ein.

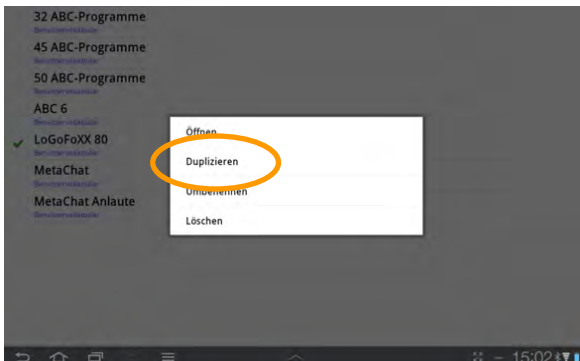


Neues Vokabular erstellen

Wenn Sie keines der mitgelieferten Vokabulare nutzen wollen, können Sie auch ein eigenes Vokabular erstellen.

Chat-Editor


- Wählen Sie **Bibliothek – Neues Vok.** (Abb. links). Ein Hinweis erscheint (Abb. Mitte). Klicken Sie auf **Weiter**.

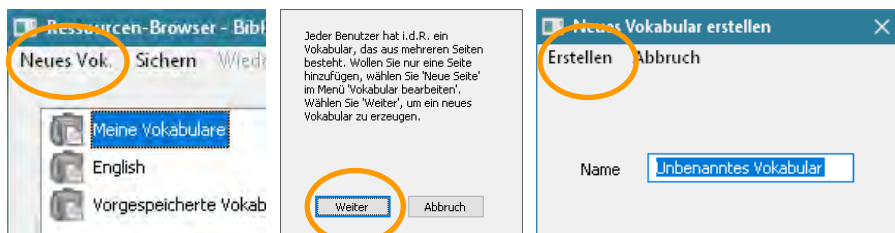




- Geben Sie einen Namen für das Vokabular ein und klicken Sie auf **Erstellen**.
- Legen Sie mind.1 Seite an und machen Sie diese zur Startseite (siehe Seite 63).

NovaChat-Gerät

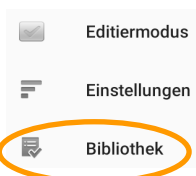
- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.



- Wählen Sie die Option **Bibliothek** .
- Tippen Sie erneut auf die Taste **MENÜ** .

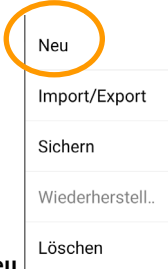

- Wählen Sie die Option **Neu**.

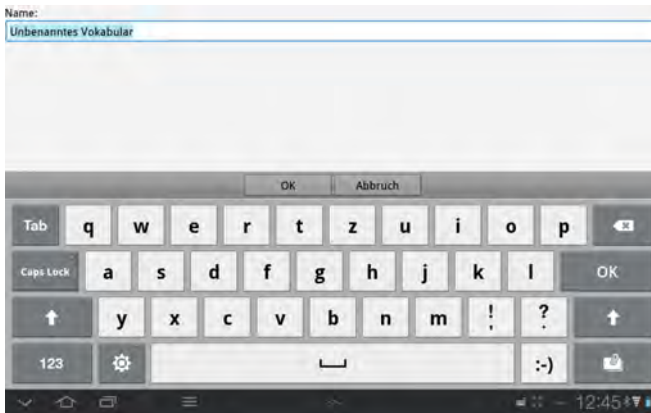


- Geben Sie einen Namen für das Vokabular ein und klicken Sie auf **OK**.
- Legen Sie mind.1 Seite an und machen Sie diese zur Startseite (siehe Seite 63).



Vokabular öffnen/wechseln


Chat-Editor

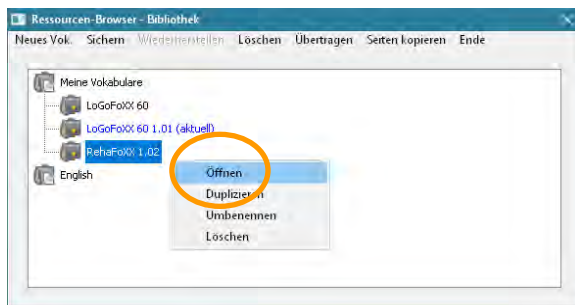- Wählen Sie Bibliothek – Meine Vokabulare.
- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das gewünschte Vokabular.
- Wählen Sie **Öffnen**.




NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.

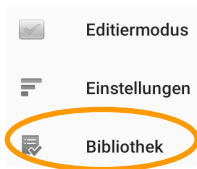

- Wählen Sie die Option **Bibliothek**.
- Die auf dem Gerät vorhandenen Vokabulare werden angezeigt.
- Tippen Sie auf das gewünschte Vokabular. Wählen Sie die Option **Öffnen**.

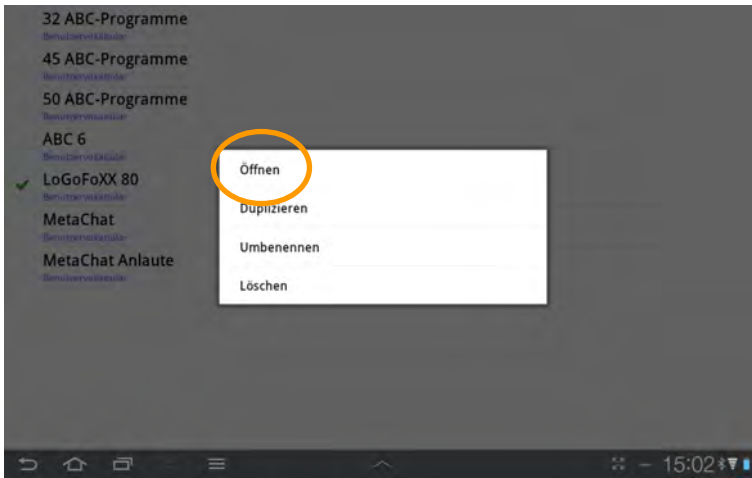


Vokabular duplizieren

Sie können ein vorhandenes Vokabular duplizieren. Es wird eine Kopie erzeugt.


Chat-Editor


- Wählen Sie **Bibliothek**.
- Klicken Sie auf **Meine Vokabulare** oder auf **Vorgespeicherte Vokabulare**.
- Klicken Sie auf das gewünschte Vokabular und wählen Sie **Duplizieren**.

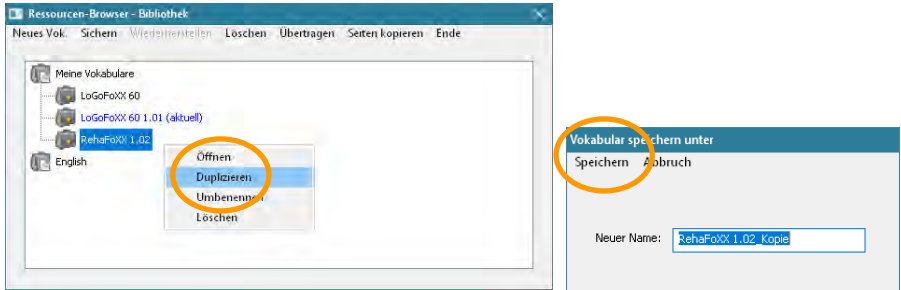


- Geben Sie einen Namen für das Vokabular ein und klicken Sie auf **Speichern**.

NovaChat-Gerät

- Tippen bzw. tippen und halten Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

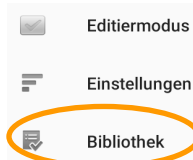

- Wählen Sie die Option **Bibliothek**.
- Die auf dem Gerät vorhandenen Vokabulare werden angezeigt. Tippen Sie auf das gewünschte Vokabular. Wählen Sie die Option **Duplizieren**.

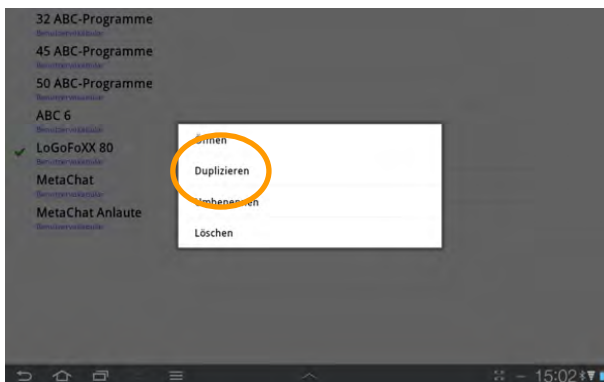


- Geben Sie einen Namen für das Vokabular ein und klicken Sie auf **OK**.

Vokabular umbenennen

Sie können den Namen eines vorhandenen Vokabulars ändern.


Chat-Editor


- Wählen Sie **Bibliothek**.
- Klicken Sie auf **Meine Vokabulare**.
- Klicken Sie auf das gewünschte Vokabular und wählen Sie **Umbenennen**.

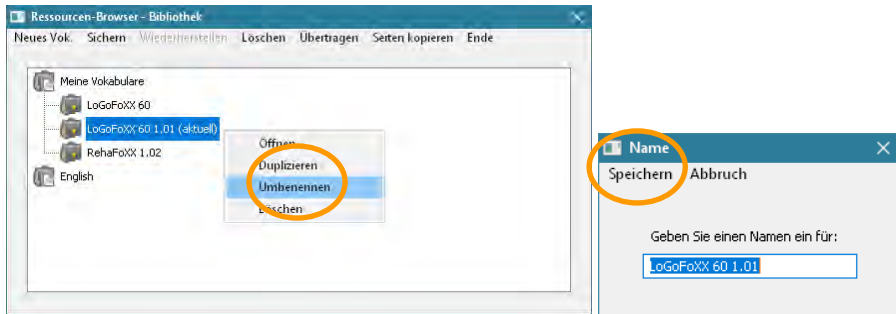


- Geben Sie einen Namen für das Vokabular ein und klicken Sie auf **Speichern**.

NovaChat-Gerät

- Tippen bzw. tippen und halten Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

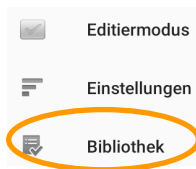

- Wählen Sie die Option **Bibliothek**.
- Die auf dem Gerät vorhandenen Vokabulare werden angezeigt.
- Tippen Sie auf das gewünschte Vokabular. Wählen Sie die Option **Umbenennen**.

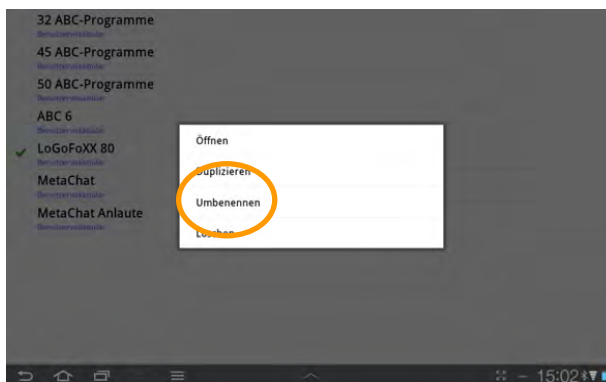

- Geben Sie einen Namen für das Vokabular ein und klicken Sie auf **OK**.

Vokabular eine Geste zuweisen

Unter einer Geste versteht man eine Eingabe mit einem oder mehreren Fingern, die zusätzlich eine Zeitinformation (Tippen, Halten) oder eine Richtung (Wischen) beinhaltet. Weisen Sie einem Vokabular eine Geste zu, steht diese auf allen Seiten des Vokabulars zur Verfügung.

Die Verwendung von Gesten muss im Menü **Einstellungen** aktiviert werden (siehe Seite 179). Verzögerungszeiten können bei Verwendung von Gesten nicht verwendet werden!

Derzeit stehen folgende Gesten zur Verfügung:

Wischen-Gesten:

- 1 Finger nach oben wischen
- 1 Finger nach unten wischen
- 1 Finger nach links wischen
- 1 Finger nach rechts wischen

Tippen-Gesten:

- 2 Finger tippen
- 3 Finger tippen
- 4 Finger tippen


Halten-Gesten:

- 1 Finger halten
- 2 Finger halten
- 3 Finger halten
- 4 Finger halten

Einer Geste kann eine Mitteilung und/oder Funktion zugewiesen werden. Es stehen dieselben Funktionen zur Verfügung, die als Tastenaktivitäten verwendet werden können (siehe Seite 100).




Chat-Editor

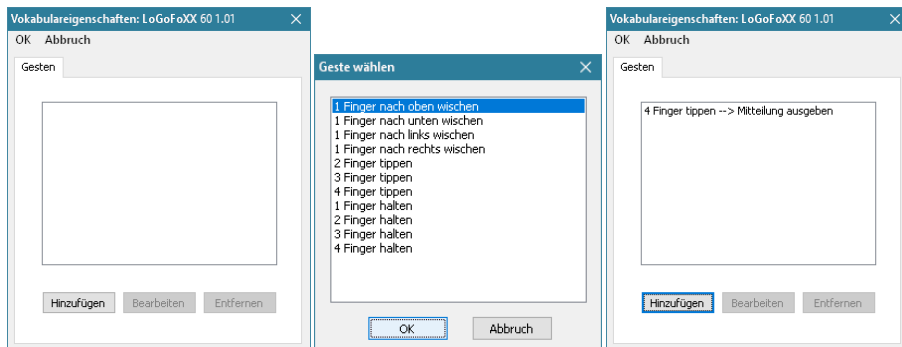
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Wollen Sie eine Geste definieren, die auf allen Seiten des Vokabulars zur Verfügung steht, so wählen Sie das Menü **Vokabular bearbeiten**.
- **Hinweis:** Wollen Sie eine Geste nur auf einer bestimmten Seite anbieten, so wählen Sie stattdessen das Menü **Seite bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Gesten**.




- Wählen Sie **Hinzufügen**.
- Wählen Sie die gewünschte Geste und bestätigen Sie die Auswahl mit OK.
- Wenn gewünscht, geben Sie ein Label und eine Mitteilung ein.
- Wählen Sie eine oder mehrere Aktivitäten (S. 100). Haben Sie der Geste eine Mitteilung zugewiesen, wählen Sie „Mitteilung ausgeben“ oder „Mitteilung sprechen“.
- Wählen Sie **OK**.


NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ** .
- Wollen Sie eine Geste definieren, die auf allen Seiten des Vokabulars zur Verfügung steht, so wählen Sie **Gesten**.

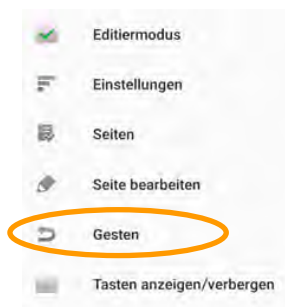

Hinweis: Wollen Sie eine Geste nur auf einer bestimmten Seite anbieten, so wählen Sie stattdessen das Menü **Seite bearbeiten** (siehe S. 65).

- Wählen Sie **Neu** .

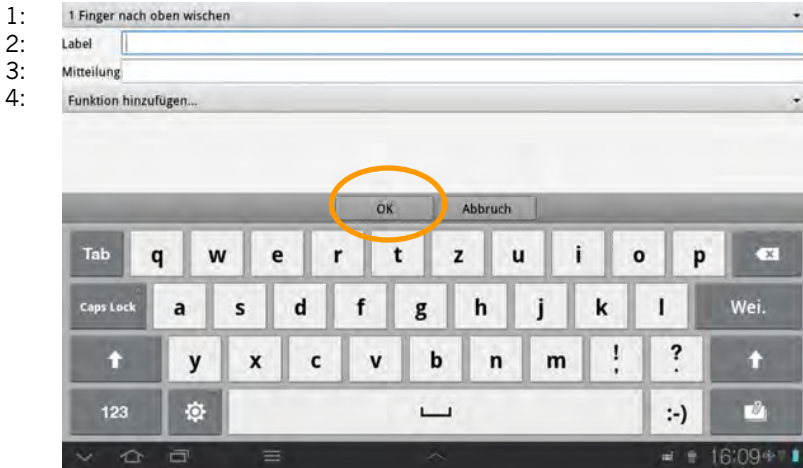

- 1: Tippen Sie auf den Balken ganz oben und wählen Sie eine Geste aus.



- 2: Wenn gewünscht, geben Sie ein Label ein.
- 3: Wenn gewünscht, geben Sie eine Mitteilung ein.
- 4: Wählen Sie unter „Funktion hinzufügen“ eine oder mehrere Aktivitäten (S. 100). Haben Sie der Geste eine Mitteilung zugewiesen, wählen Sie „Mitteilung ausgeben“ oder „Mitteilung sprechen“.
- Wählen Sie **OK**.


Vokabular löschen

Sie können selbst erstellte Vokabulare löschen.


Einzelnes Vokabular löschen


Chat-Editor

- Wählen Sie **Bibliothek**.
- Klicken Sie auf **Meine Vokabulare**.
- Klicken Sie auf das gewünschte Vokabular und wählen Sie **Löschen**.
- Geben Sie im Bestätigungsfenster „ja“ ein und wählen Sie **Weiter**.

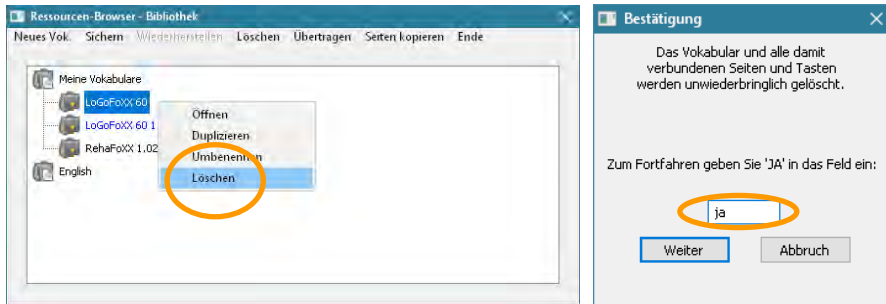

NovaChat-Gerät


- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wählen Sie die Option **Bibliothek** .
- Die auf dem Gerät vorhandenen Vokabulare werden angezeigt. Tippen Sie auf das gewünschte Vokabular. Wählen Sie die Option **Löschen**.
- Bestätigen Sie das Löschen durch Tippen auf „Ja“.

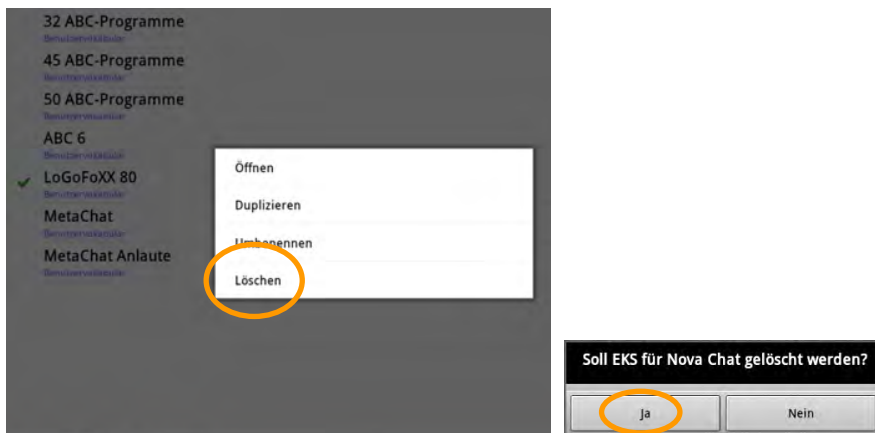


Mehrere Vokabulare auf einmal löschen

Chat-Editor

- Öffnen Sie das Menü **Bibliothek**.

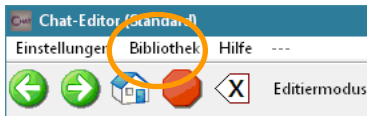


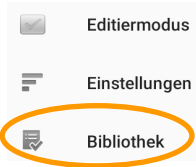
- Wählen Sie die Option **Löschen**. Das Fenster **Mehrere Vokabulare löschen** wird angezeigt.

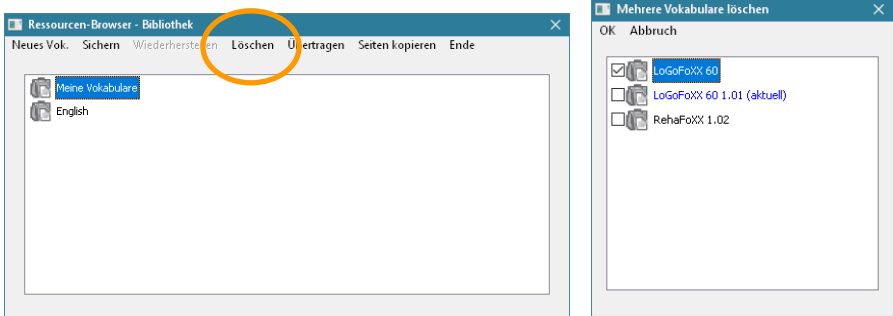


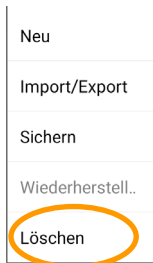
- Markieren Sie alle Vokabulare, die Sie löschen wollen (Sie können nur selbst angelegte Vokabulare löschen). Um ein Vokabular zu markieren, klicken Sie jeweils in das kleine Kästchen links neben dem Namen des Vokabulars.
- Klicken Sie auf **OK**, um die ausgewählten Vokabulare zu löschen.

NovaChat-Gerät


- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.



- Wählen Sie die Option **Bibliothek**
- Tippen Sie erneut die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .



- Wählen Sie **Löschen**
- Die auf dem Gerät vorhandenen eigenen Vokabulare werden angezeigt.

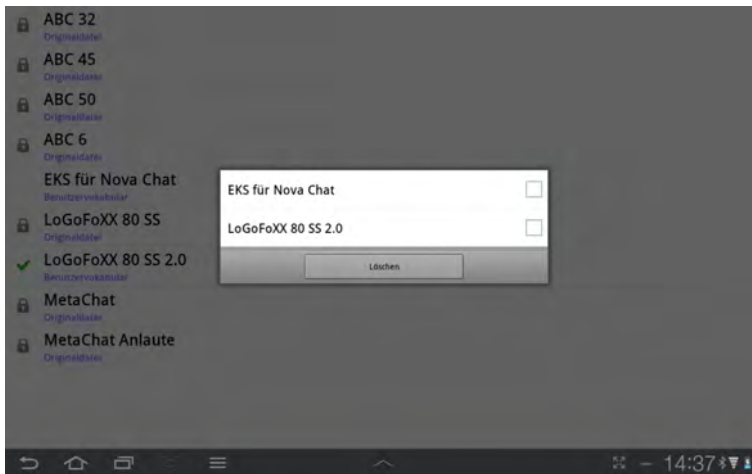

- Markieren Sie alle Vokabulare, die Sie löschen wollen (Sie können nur selbst angelegte Vokabulare löschen). Um ein Vokabular zu markieren, tippen Sie jeweils auf den Namen des Vokabulars in der Liste.
- Klicken Sie auf **Löschen**, um die ausgewählten Vokabulare zu löschen.

SEITEN BEARBEITEN

Seite erzeugen


Es gibt 3 Möglichkeiten, neue Seiten zu erzeugen:

- eine neue leere Seite anlegen
- eine bestehende Seite duplizieren
- eine neue Seite von einer Vorlage anlegen


Neue Seite anlegen

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Wählen Sie **Seiten – Neue Seite**.

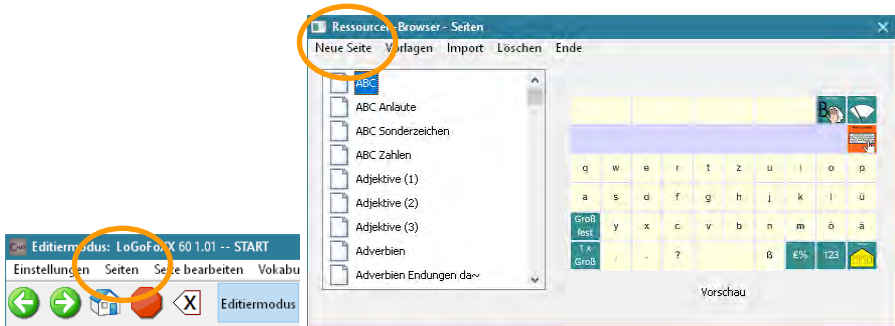

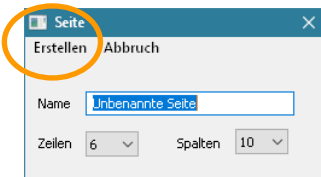


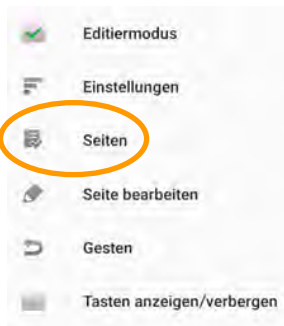
- Im folgenden Dialog können Sie der Seite einen Namen geben sowie die Anzahl der Zeilen und Spalten festlegen. Die Zahl der Tastenfelder ergibt sich aus dem Produkt aus Zeilen mal Spalten. Mögliche Werte sind 1 x 1 bis 20 x 20 Tasten.




- Klicken Sie anschließend auf **Erstellen**.

NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .




- Wählen Sie **Seiten**
- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

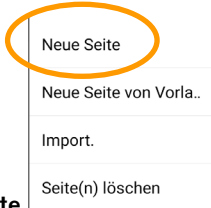

- Wählen Sie **Neue Seite**

Im folgenden Dialog können Sie der Seite einen Namen geben sowie die Anzahl der Zeilen und Spalten festlegen. Die Zahl der Tastenfelder ergibt sich aus dem Produkt aus Zeilen mal Spalten. Mögliche Werte sind 1 x 1 bis 20 x 20 Tasten.

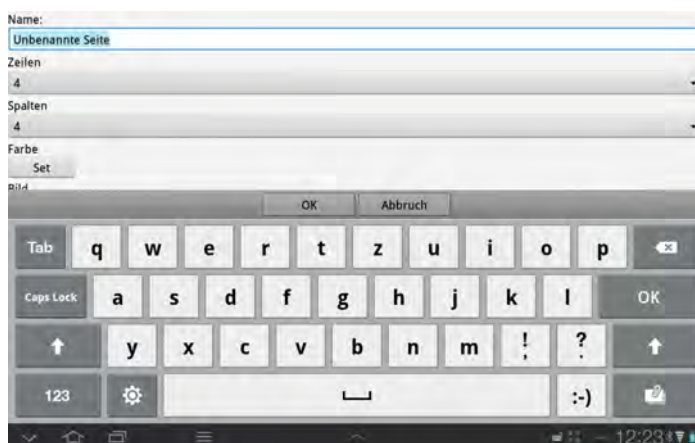


Seite duplizieren


Mit dem Duplizieren erstellen Sie eine Kopie einer existierenden Seite.

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Öffnen Sie das Menü **Seiten**.
- Linksklicken Sie auf der Seite, die Sie duplizieren wollen.
- Wählen Sie **Duplizieren**

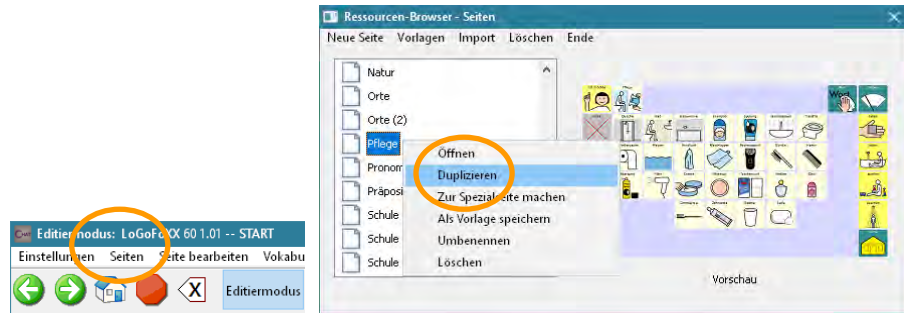

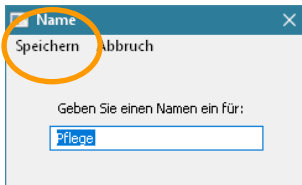


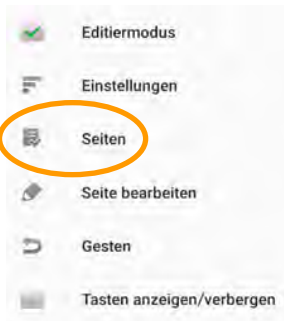
- Geben Sie einen Namen für die Seite ein.




- Klicken Sie auf **Speichern**.

NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .



- Wählen Sie **Seiten**.
- Klicken Sie auf die Seite, die Sie duplizieren wollen. Wählen Sie **Duplizieren**.

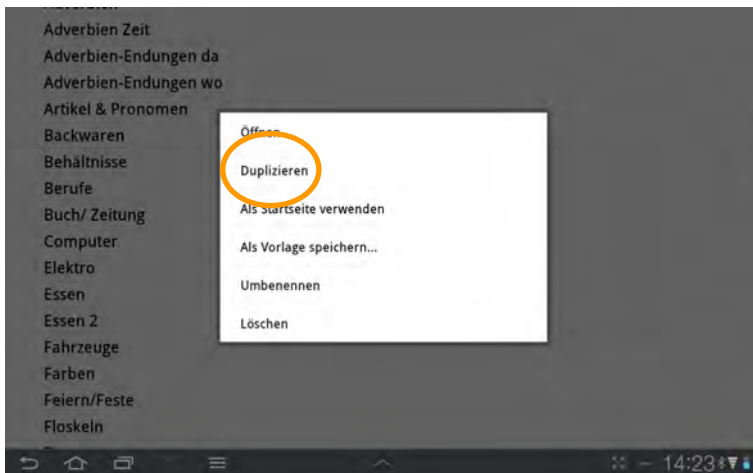


- Geben Sie einen Namen für die neue Seite ein.

Seite als Vorlage speichern


Verfügen die Seiten Ihres Vokabulars über identische Tastenfelder, so legen Sie eine Vorlage an. Erstellen Sie dann die neuen Seiten von der Vorlage.

Chat-Editor

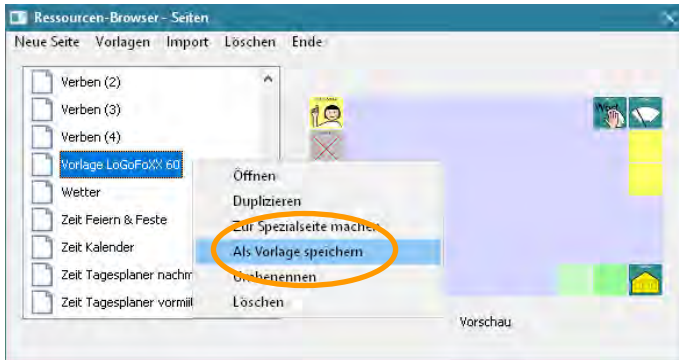


- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Wählen Sie **Seiten**. Der Ressourcen-Browser zeigt alle vorhandenen Seiten an.
- Linksklicken Sie auf der Seite, die als Vorlage dienen soll.
- Wählen Sie **Als Vorlage speichern**.

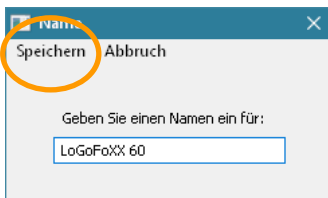


- Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein und wählen Sie **Speichern**.




NovaChat-Gerät


- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

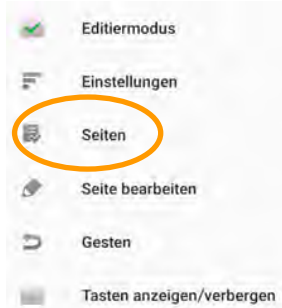

- Wählen Sie **Seiten**
- Alle vorhandenen Seiten werden angezeigt.
- Tippen Sie auf die Seite, die als Vorlage dienen soll.
- Wählen Sie **Zur Spezialseite machen....**
- Wählen Sie **Vorlage**

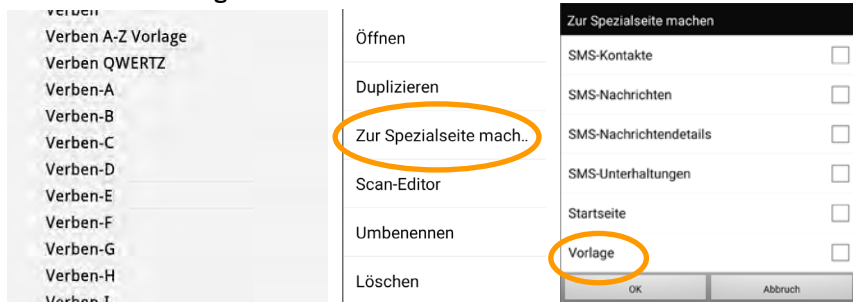

- Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein und wählen Sie **OK**.

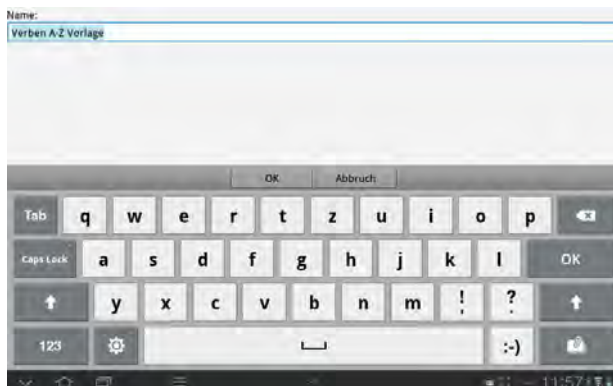


Seite von Vorlage anlegen

Sie müssen mindestens eine Seitenvorlage angelegt haben, um eine Seite von einer Vorlage anlegen zu können!

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Wählen Sie **Seiten – Vorlagen – Neue Seite von Vorlage**.

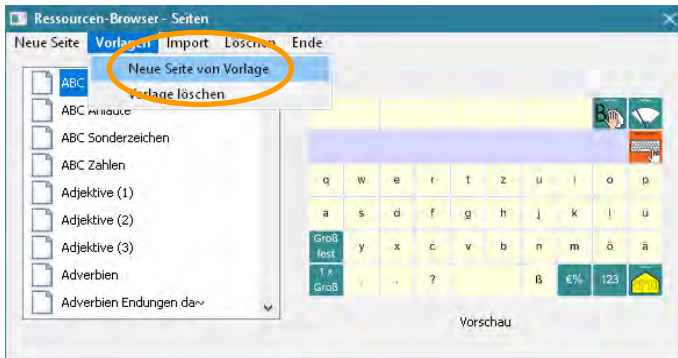




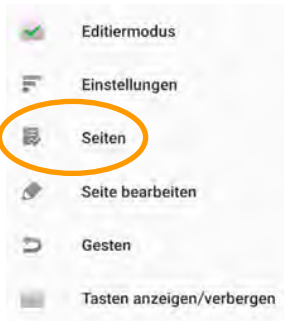
- Klicken Sie auf die Vorlage, von der Sie die neue Seite anlegen wollen.
- Selbst angelegte Vorlagen stehen ebenso zur Verfügung wie mitgelieferte, vokabularspezifische Vorlagen.




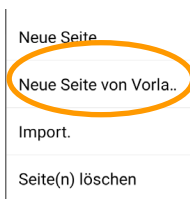
- Wählen Sie **Auswahl**.
- Geben Sie einen Namen für die neue Seite ein.

NovaChat-Gerät


- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .



- Wählen Sie **Seiten**.
- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .



- Wählen Sie **Neue Seite von Vorlage**.
- Tippen Sie auf die Vorlage, von der Sie die neue Seite anlegen wollen. Die Seitenvorlage wird angezeigt.
- Wählen Sie „OK“.
- Geben Sie einen Namen für die neue Seite ein.

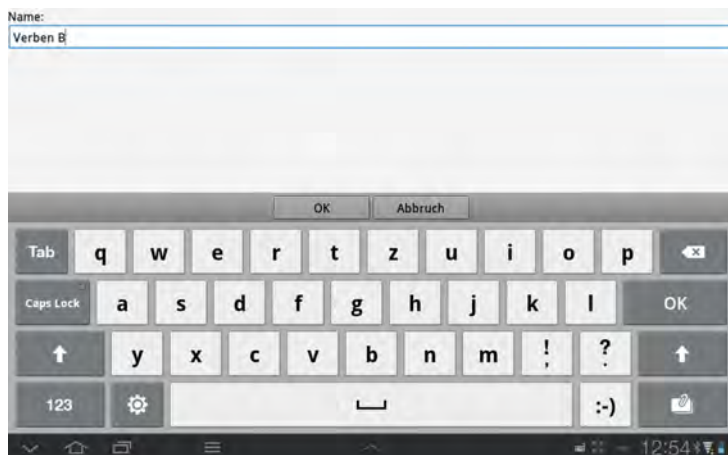


Seiteneigenschaften bearbeiten


Sie können einer Seite eine Hintergrundfarbe oder ein Hintergrundbild zuweisen und die Zahl der Tastenfelder ändern.

Chat-Editor

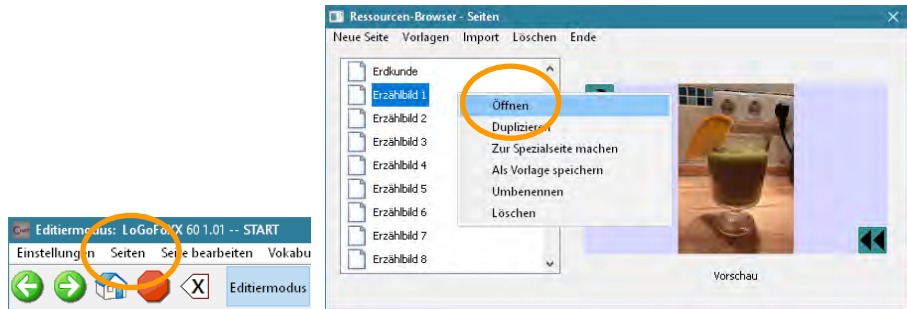


- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Öffnen Sie das Menü **Seiten**.
- Linksklicken Sie auf der Seite, deren Eigenschaften Sie bearbeiten wollen.
- Wählen Sie **Öffnen**.

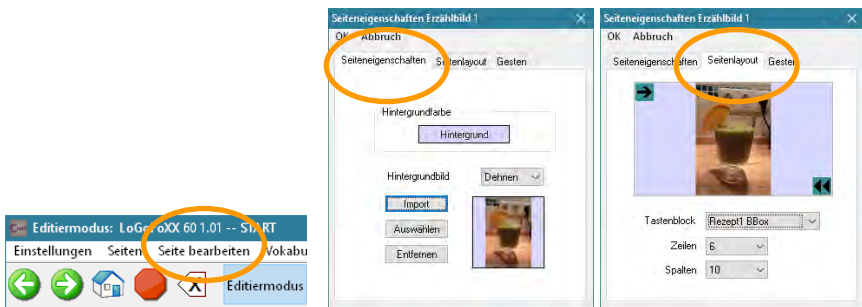


- Wählen Sie **Seite bearbeiten**.
 - Wählen Sie den Reiter **Seiteneigenschaften**, wenn Sie die Hintergrundfarbe der Seite ändern wollen. Wählen Sie eine Hintergrundfarbe.
 - Wählen Sie den Reiter **Seiteneigenschaften**, wenn Sie ein Hintergrundbild auswählen oder importieren wollen (siehe S. 56 für Hintergrundbilder).
 - Wählen Sie den Reiter **Seitenlayout**, wenn Sie die Zahl der Tastenfelder der Seite verändern wollen. Geben Sie die gewünschte Anzahl von Zeilen und Spalten ein.
- Warnung:** Wenn Sie die Anzahl der Spalten bzw. Zeilen reduzieren, gehen die entsprechenden Tastenfelder rechts bzw. unten unwiederbringlich verloren!





NovaChat-Gerät

- Öffnen Sie die zu bearbeitende Seite.
- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**
- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ** .

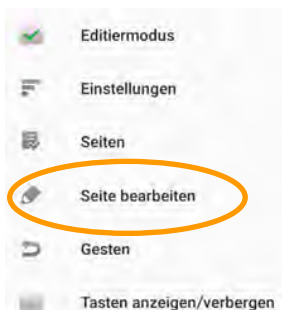

- Wählen Sie **Seite bearbeiten**
- Wählen Sie den Reiter **Allgemein**, wenn Sie die **Hintergrundfarbe** der Seite ändern wollen. Wählen Sie eine Hintergrundfarbe.
- Wählen Sie den Reiter **Allgemein**, wenn Sie ein **Hintergrundbild** auswählen oder importieren wollen (siehe S. 56 für Hintergrundbilder).
- Wählen Sie den Reiter **Layout**, wenn Sie die Zahl der Tastenfelder der Seite verändern wollen. Geben Sie die gewünschte Anzahl von Zeilen und Spalten ein.
Warnung: Wenn Sie die Anzahl der Spalten bzw. Zeilen reduzieren, gehen die entsprechenden Tastenfelder rechts bzw. unten unwiederbringlich verloren!

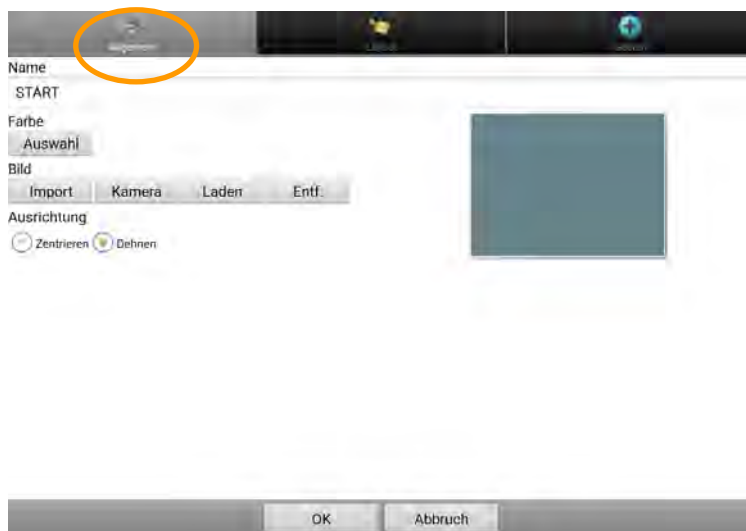


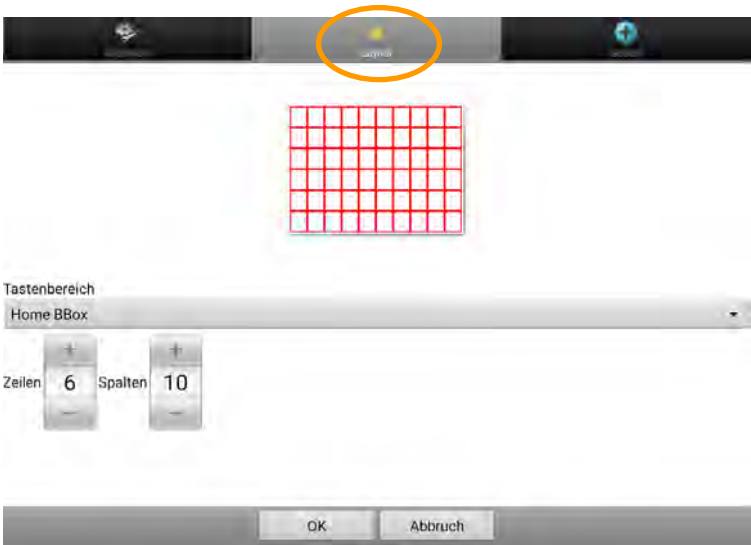


Seite verknüpfen


Verfügt das Vokabular über mehr Aussagen, als die Startseite Felder hat, muss das Vokabular über mehrere Seiten verteilt werden. Die Chat-Software bietet die Möglichkeit, dauerhaft auf eine andere Seite zu wechseln oder nur für eine Aussage. Nach dem Wechsel auf eine Seite nur für eine Aussage kann der Rücksprung zur vorigen oder zur Startseite erfolgen.

Dauerhaft auf eine andere Seite wechseln

- Belegen Sie eine Taste mit der Funktion **Seite anzeigen** (siehe S. 98). Löschen Sie ggf. die Funktion „Mitteilung ausgeben“.
- Die Liste aller verfügbaren Seiten wird angezeigt.
- Ist die gewünschte Seite bereits vorhanden, wählen Sie sie aus. Anderenfalls wählen Sie **Neue Seite** (Chat-Editor) bzw. **Neu** (NovaChat-Gerät), um eine neue Seite anzulegen.
- Wählen Sie **Hinzufügen** (Chat-Editor) bzw. **OK** (NovaChat-Gerät).
- Wählen Sie die **Animation**, d.h. wie die Seite erscheinen soll.

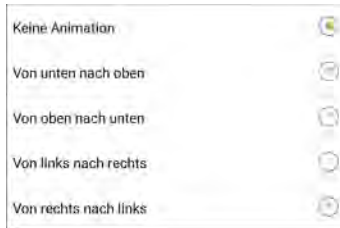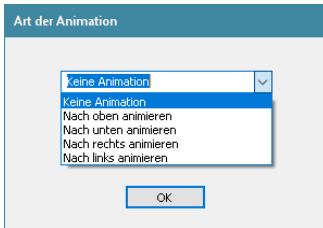

- Haben Sie **Neue Seite** gewählt, so geben Sie einen Namen für die neue Seite ein und gestalten Sie sie.

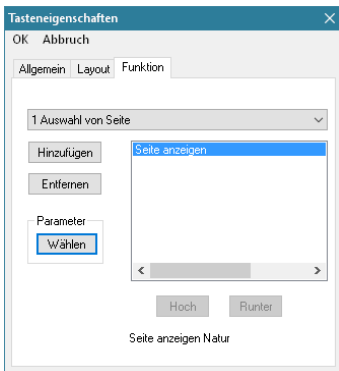

Sprungindikator

Ein schwarzer Pfeil auf weißem Grund oben auf einer Taste zeigt an, dass durch das Feld dauerhaft auf eine andere Seite gesprungen wird. Die Größe des Pfeils ist einstellbar (siehe S. 207). Sie benötigen ein mit „Startseite anzeigen“, „Seite anzeigen“ oder „vorige Seite anzeigen“ belegtes Feld auf dieser Seite, um sie wieder verlassen zu können.





Für eine Auswahl auf eine andere Seite wechseln

Es gibt 2 Funktionen zum Wechseln auf eine andere Seite mit automatischem Rücksprung nach Auswahl einer Taste auf dieser Seite.


Bei der Funktion **1 Auswahl von Seite** erfolgt der Rücksprung zur aufrufenden (vorigen) Seite.

Bei der Funktion **Springe zu Seite** erfolgt der Rücksprung zur Startseite, unabhängig von der aufrufenden (vorigen) Seite.

- Löschen Sie die vorgespeicherte Funktion „Mitteilung ausgeben“ und speichern Sie die Funktion **1 Auswahl von Seite** oder die Funktion **Springe zu Seite** (siehe S. 98).
- Die Liste aller verfügbaren Seiten wird angezeigt.
- Ist die gewünschte Seite bereits vorhanden, wählen Sie sie aus. Anderenfalls wählen Sie **Neue Seite** (Chat-Editor) bzw. **Neu** (NovaChat-Gerät), um eine neue Seite anzulegen.
- Wählen Sie **Hinzufügen** (Chat-Editor) bzw. **OK** (NovaChat-Gerät).
- Wählen Sie die **Animation**, d.h. wie die Seite erscheinen soll.

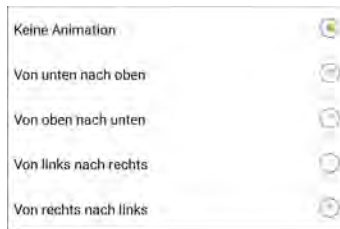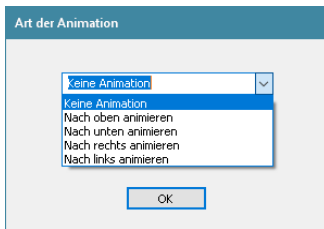

- Haben Sie **Neue Seite** gewählt, so geben Sie einen Namen für die neue Seite ein und gestalten Sie sie.

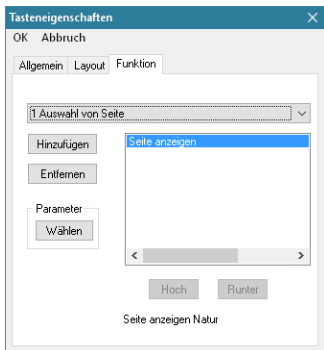

Sprungindikator

Ein weißer Pfeil auf schwarzem Grund oben auf einer Taste zeigt an, dass durch das Feld für eine Auswahl auf eine andere Seite gesprungen wird. Die Größe des Pfeils ist einstellbar (siehe S. 207).

Nach Auswahl einer beliebigen Taste auf dieser Seite erfolgt automatisch der Rücksprung zur aufrufenden Seite (bei Verwendung des Befehls **1 Auswahl von Seite**) bzw. zur Startseite (bei Verwendung des Befehls **Springe zu Seite**).



Seitennavigationsbefehle

1 Auswahl von Seite	Die Seite wird nur für die Auswahl eines Feldes angezeigt, danach erfolgt automatisch der Rücksprung zur vorigen Seite.
Alle Seiten schließen	Alle per „1 Auswahl von Seite“ geöffneten Seiten werden geschlossen.
Auf Seite bleiben für 1 Auswahl	Die per „1 Auswahl von Seite“ oder „Springe zu Seite“ geöffnete Seite wird trotz Auswahl eines Feldes nicht geschlossen, es kann ein weiteres Feld ausgewählt werden. Erst dann erfolgt der Rücksprung.
Seite anzeigen	Eine Seite dauerhaft anzeigen.
Springe zu Seite	Die Seite wird nur für die Auswahl eines Feldes angezeigt, danach erfolgt automatisch der Rücksprung zur Startseite.
Startseite anzeigen	Die als Startseite definierte Seite des Vokabulars dauerhaft anzeigen.
Vorige Seite anzeigen	Die vorige Seite anzeigen.


Situationsbilder

Situationsbilder werden häufig in der Therapie eingesetzt. Sie nehmen i. d. R. den gesamten Bildschirm ein. Einzelnen Bereichen des Bildes können individuelle Mitteilungen zugewiesen werden. Wählen Sie ein zum Situationsbild passendes Raster.


Situationsbild verwenden

Chat-Editor


- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Öffnen Sie das Menü **Seiten**.

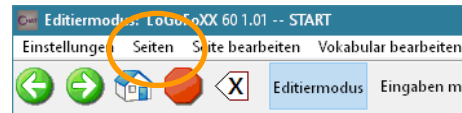


- Wenn Sie für das Situationsbild eine neue Seite anlegen wollen, wählen Sie **Neue Seite**. Wählen Sie eine große Zahl an Feldern (z.B. 20x20), um auch kleinen Details ein Feld zuweisen zu können.
- Haben Sie bereits eine Seite für das Situationsbild angelegt, linksklicken Sie auf der Seite und wählen Sie **Öffnen**.

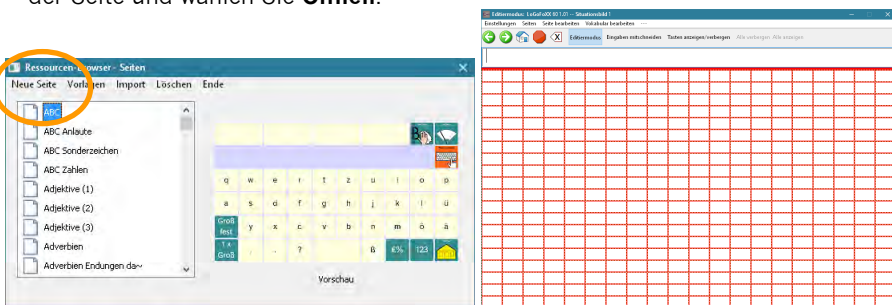

- Wählen Sie das Menü **Seite bearbeiten**. Das Fenster **Seiteneigenschaften** wird angezeigt.

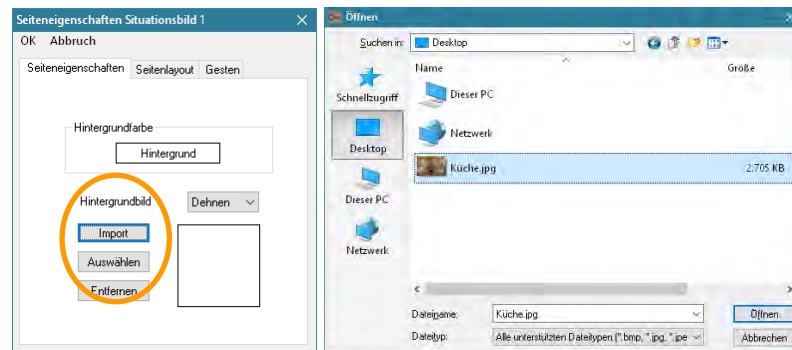

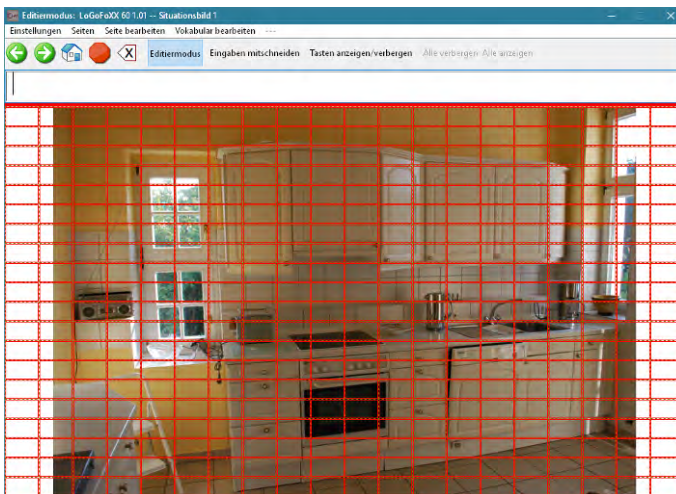


- Um ein Situationsbild zu importieren, wählen Sie **Hintergrundbild: Import**, und wählen Sie das Bild aus.
- Um ein Situationsbild zu nutzen, das bereits in den Ressourcen vorhanden ist, wählen Sie **Hintergrundbild: Auswählen**, und wählen Sie das Bild aus.
- Wählen Sie, ob das Bild in Originalgröße **zentriert** oder auf Displaygröße **gedehnt** werden soll. Je nach Proportion des Bildes kann es sein, dass das Bild nicht das gesamte Display ausfüllt.
- Gestalten Sie die Tastenfelder mit zum Situationsbild geeigneten Aussagen (siehe S. 82ff). Achten Sie darauf, bei den Tasteneigenschaften im Bereich Layout die Option **Transparenz** auszuwählen. Soll dem Benutzer ein Hinweis in Textform auf die gespeicherten Mitteilungen gegeben werden, so verwenden Sie dafür **Tastenlabel**.




- Legen Sie Felder mit identischer Belegung mit Hilfe der Funktion **Tastengröße ändern** zusammen oder verwenden Sie die Funktion **Taste kopieren** in Verbindung mit **Taste verknüpfen**, um identische Bereiche zu füllen.




NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Haben Sie bereits eine Seite für das Situationsbild angelegt, öffnen Sie die Seite.
- Wenn Sie für das Situationsbild eine neue Seite anlegen wollen, wählen Sie **Neue Seite** (siehe S. 42). Wählen Sie eine große Zahl an Feldern (z.B. 20 x 20), um auch kleinen Details ein Feld zuweisen zu können.
- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

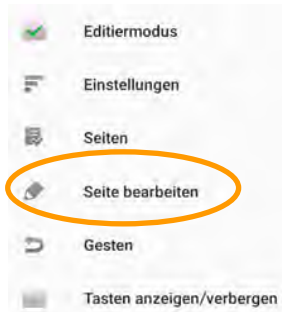

- Wählen Sie **Seite bearbeiten**
- Das Fenster Seiteneigenschaften wird angezeigt.

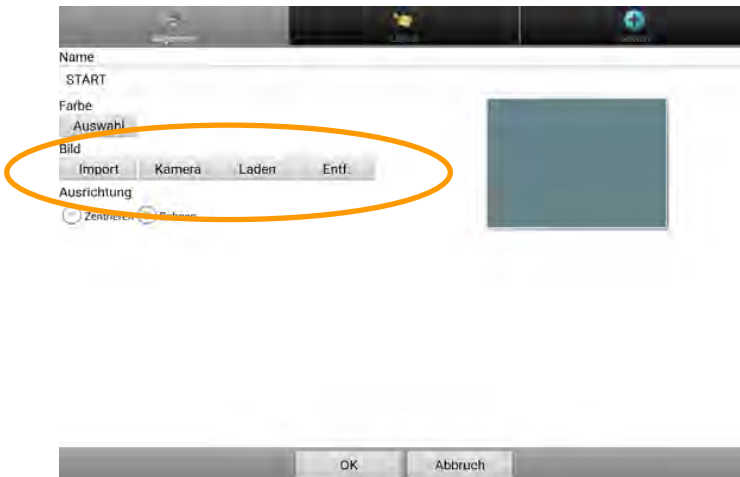


- Um ein Situationsbild aus den auf dem Tablet vorhandenen Bildern zu importieren, wählen Sie **Bild: Import**, und wählen Sie das Bild aus.
- Um ein Situationsbild zu nutzen, dass bereits in den NovaChat-Ressourcen vorhanden ist, wählen Sie **Bild: Laden**, und wählen Sie das Bild aus.
- Um ein Situationsbild mit der im Tablet eingebauten Kamera zu machen, wählen Sie **Bild: Kamera**, und machen Sie ein Foto. Wählen Sie anschließend Speichern und geben Sie dem Foto einen Namen.

- Wählen Sie, ob das Bild in Originalgröße **zentriert** oder auf Displaygröße **gedehnt** werden soll. Je nach Proportion des Bildes kann es sein, dass das Bild nicht das gesamte Display ausfüllt.
- Gestalten Sie die Tastenfelder mit zum Situationsbild geeigneten Aussagen (siehe S. 82ff). Achten Sie darauf, bei den Tasteneigenschaften im Bereich Layout die Option **Transparenz** auszuwählen. Soll dem Benutzer ein Hinweis in Textform auf die gespeicherten Mitteilungen gegeben werden, so verwenden Sie dafür **Tastenlabel**.



- Legen Sie Felder mit identischer Belegung mit Hilfe der Funktion **Tastengröße ändern** zusammen oder verwenden Sie die Funktion **Taste kopieren** in Verbindung mit **Taste verknüpfen**, um identische Bereiche zu füllen.

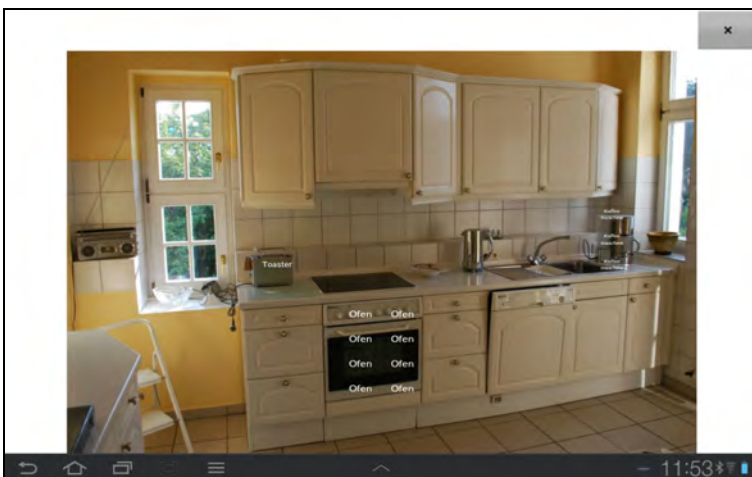


Seite importieren


Gibt es eine oder mehrere Seiten, die Sie gerne im aktiven Vokabular hätten, bereits in einem anderen Vokabular des NovaChats, so brauchen Sie sie nicht erneut zu erstellen. Importieren Sie einfach die entsprechenden Seiten.

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Öffnen Sie das Menü **Seiten**.

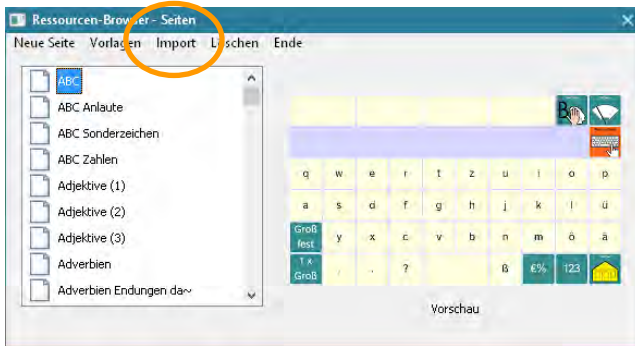

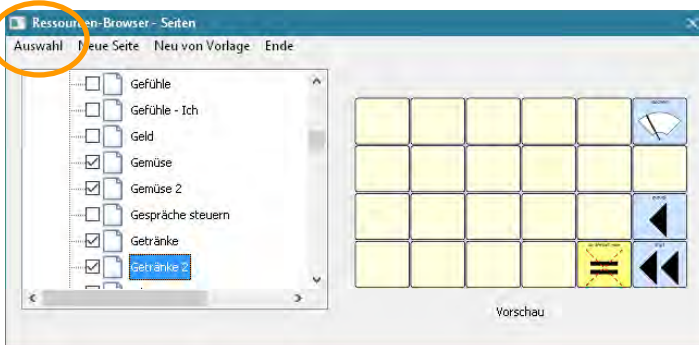


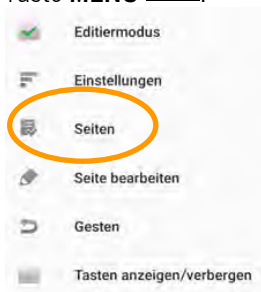
- Wählen Sie die Option **Import**.
- Der Ressourcen-Browser zeigt die Vokabulare und die darin vorhandenen Seiten an.
- Wählen Sie das Vokabular, das die gewünschte(n) Seite(n) enthält.
- Markieren Sie die zu kopierende(n) Seite(n), indem Sie in das kleine Kästchen links vom Seitennamen klicken.




- Wählen Sie **Auswahl**. Die Seiten werden kopiert.

NovaChat-Gerät


- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ** .



- Wählen Sie **Seiten**
- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ** .

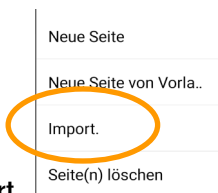

- Wählen Sie **Import.**
- Wählen Sie das Vokabular, das die gewünschten Seiten enthält.
- Markieren Sie die zu importierenden Seiten, indem Sie jeweils auf den Namen der Seite tippen.

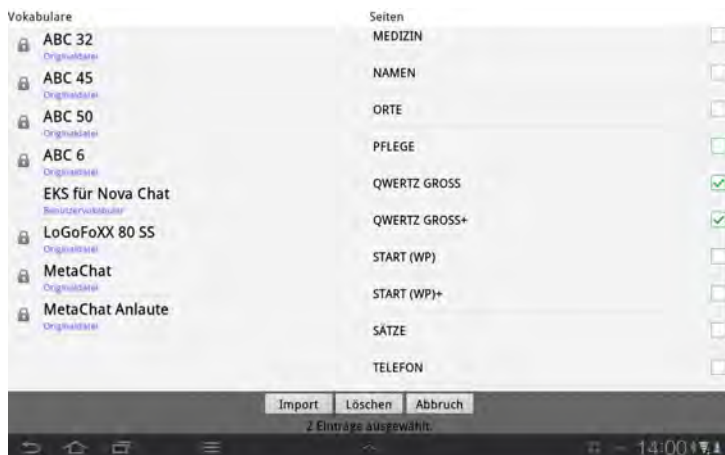


- Wählen Sie **Import.**


Seite kopieren

Sie können einzelne oder mehrere Seiten von einem in ein anderes Vokabular kopieren. Diese Funktion steht nur im Chat-Editor zur Verfügung.

- Öffnen Sie das Menü **Bibliothek**.
- Wählen Sie die Option **Seiten kopieren**.

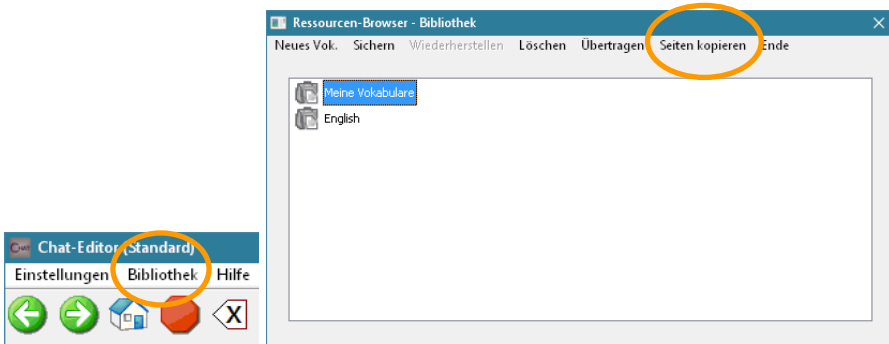

- Das Fenster **Mehrere Seiten kopieren** wird angezeigt.

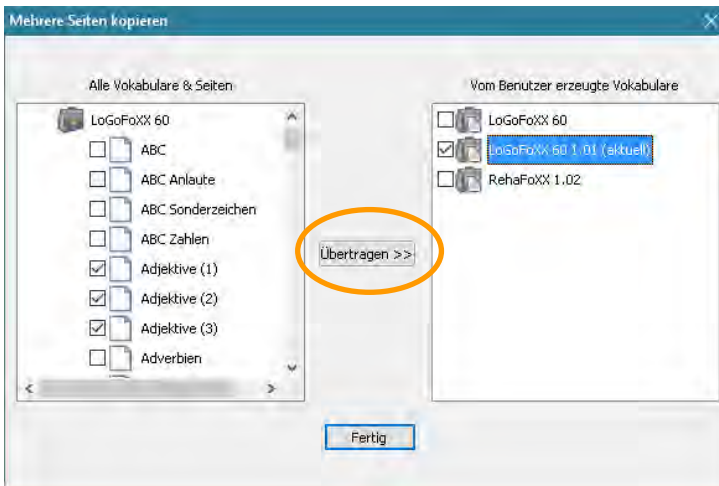

- Wählen Sie im linken Fenster das Vokabular aus, das die Seiten enthält, die Sie kopieren wollen.
- Markieren Sie die zu kopierenden Seiten, indem Sie jeweils in dem Kästchen links neben dem Namen der Seite einen Haken setzen.
- Markieren Sie im rechten Fenster das Vokabular, in das die ausgewählten Seiten kopiert werden sollen.
- Wählen Sie **Übertragen >>**.

Startseite festlegen

Unter der Startseite versteht man die Seite, die als Ausgangsseite eines Vokabulars dient. Durch Betätigen einer mit der Funktion **Startseite anzeigen** belegten Taste wird die Startseite angezeigt.


Jedes Vokabular muss über eine Startseite verfügen, ansonsten zeigt der NovaChat eine Fehlermeldung an.

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Öffnen Sie das Menü **Seiten**.
- Klicken Sie auf die Seite, die Sie zur Startseite machen wollen.



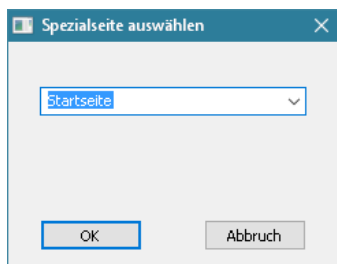


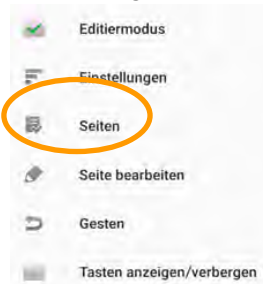
- Wählen Sie **Zur Spezialseite machen**




- Wählen Sie **Startseite**.

NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ** .



- Wählen Sie **Seiten**.
- Tippen Sie auf die Seite, die Sie zur Startseite machen wollen.

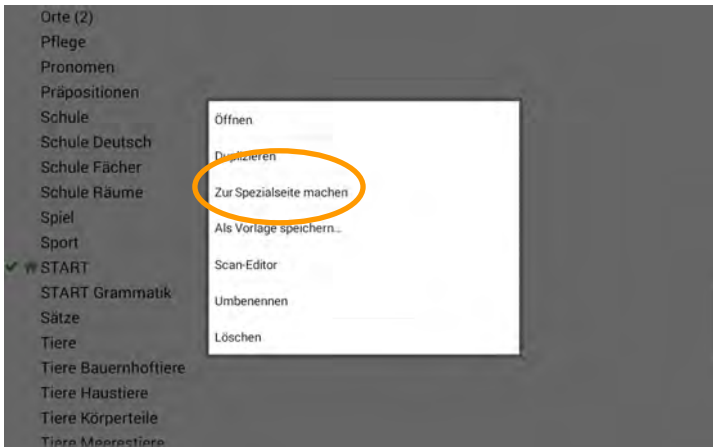

- Wählen Sie **Zur Spezialseite machen**



- Wählen Sie **Startseite**.

Seite eine Geste zuweisen

Unter einer Geste versteht man eine Eingabe mit einem oder mehreren Fingern, die zusätzlich eine Zeitinformation (Tippen, Halten) oder eine Richtung (Wischen) beinhaltet. Weisen Sie einer Seite eine Geste zu, steht diese nur auf der jeweiligen Seite des Vokabulars zur Verfügung. Weisen Sie einem Vokabular eine Geste zu, steht diese auf allen Seiten des Vokabulars zur Verfügung (siehe S. 35).

Die Verwendung von Gesten muss im Menü **Einstellungen** aktiviert werden (siehe Seite 179). Verzögerungszeiten können bei Verwendung von Gesten nicht verwendet werden!

Derzeit stehen folgende Gesten zur Verfügung:

Wischen-Gesten:

- 1 Finger nach oben Wischen
- 1 Finger nach unten Wischen
- 1 Finger nach links Wischen
- 1 Finger nach rechts Wischen

Tippen-Gesten:

- 2 Finger tippen
- 3 Finger tippen
- 4 Finger tippen


Halten-Gesten:

- 1 Finger halten
- 2 Finger halten
- 3 Finger halten
- 4 Finger halten

Einer Geste kann (wie einer Taste) eine Mitteilung und/oder Funktion zugewiesen werden. Es stehen dieselben Funktionen zur Verfügung, die als Tastenaktivitäten verwendet werden können (siehe Seite 100).




Chat-Editor

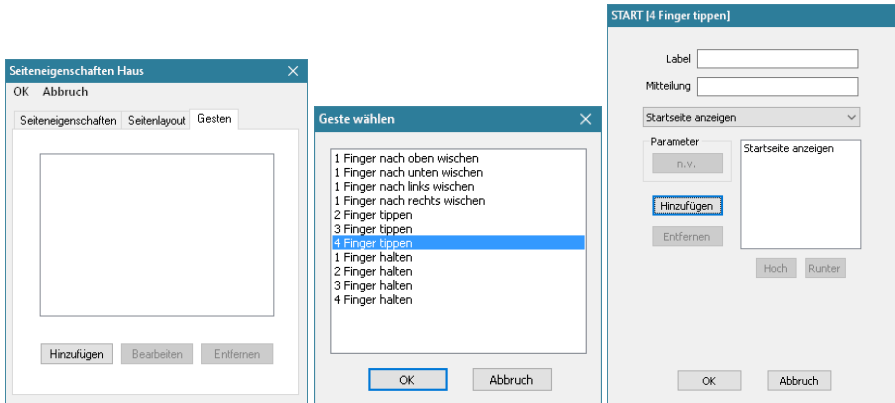
- Öffnen Sie die Seite, der eine oder mehrere Gesten zugewiesen werden sollen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Öffnen Sie das Menü **Seite bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Gesten**.



- Wählen Sie **Hinzufügen**.
- Wählen Sie die gewünschte Geste und bestätigen Sie die Auswahl mit OK.
- Wenn gewünscht, geben Sie ein Label und eine Mitteilung ein.
- Wählen Sie eine oder mehrere Aktivitäten (S. 100). Haben Sie der Geste eine Mitteilung zugewiesen, wählen Sie „Mitteilung ausgeben“ oder „Mitteilung sprechen“.
- Wählen Sie **OK**.


NovaChat-Gerät

- Öffnen Sie die Seite, der eine oder mehrere Gesten zugewiesen werden sollen.
- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ** .

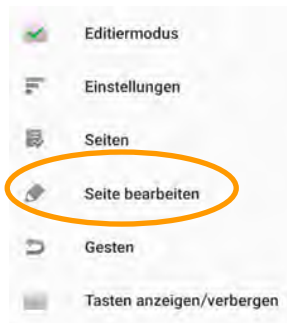


- Wählen Sie **Seite bearbeiten**

- Wählen Sie den Reiter **Gesten**.

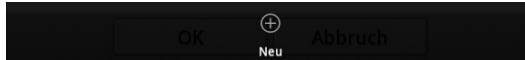

- Wählen Sie **Neu**.

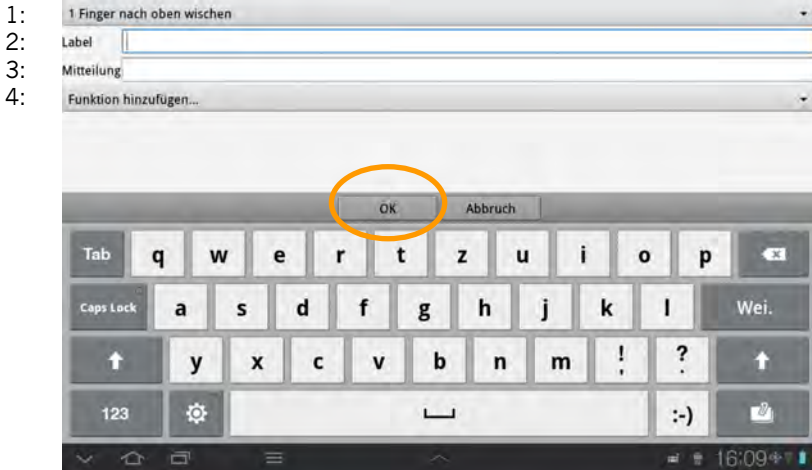




- 1: Tippen Sie auf den Balken ganz oben und wählen Sie eine Geste aus.
- 2: Wenn gewünscht, geben Sie ein Label ein.
- 3: Wenn gewünscht, geben Sie eine Mitteilung ein.
- 4: Wählen Sie unter „Funktion hinzufügen“ eine oder mehrere Aktivitäten (S. 100). Haben Sie der Geste eine Mitteilung zugewiesen, wählen Sie „Mitteilung ausgeben“ oder „Mitteilung sprechen“.
- Wählen Sie **OK**.


Seite ein individuelles Scan-Muster zuweisen

Bei der Ansteuerung des NovaChats im Scanning-Modus können Sie zusätzlich zu den Standard-Scanmustern linear, Zeile/Spalte, Block oder fließend auch individuelle Scanmuster für einzelne oder mehrere Seiten definieren.


Mit Hilfe des Scan-Editors können Sie Gruppen von Tasten definieren, die als zusammengehörender Block gescannt werden. Innerhalb von Gruppen können Sie Untergruppen definieren.

NovaChat-Gerät


- Öffnen Sie die Seite, der eine oder mehrere Gesten zugewiesen werden sollen.
- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ** .

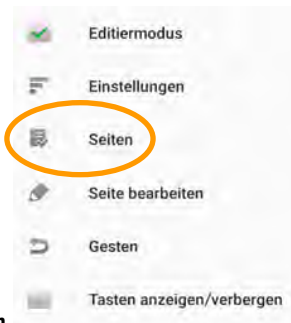

- Wählen Sie **Seiten**.
- Wählen Sie die Seite, der Sie ein individuelles Scanmuster zuweisen wollen.
- Das Kontextmenü öffnet sich. Wählen Sie **Scan-Editor**.

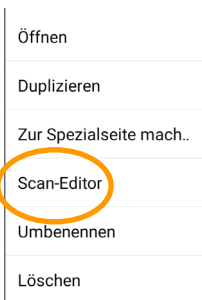

- Wählen Sie, ob Sie das Scanmuster für alle Seiten, die dieses Muster verwenden, ändern wollen (**Alle Seiten**), oder für diese Seite ein eigenes Scanmuster erzeugen wollen (**Nur diese Seite**).

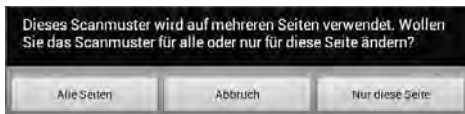


- Der Scan-Editor wird geöffnet und zeigt die oberste Ebene:



Gruppen und Untergruppen erzeugen

Der Scan-Editor kann automatisch Scanblöcke (Gruppen von Tasten) erzeugen

- Wählen Sie **Untergr. aut. hinzufg.** oder **Alle Untergr. aut. hinzufg.** Abhängig vom gewählten Scan-Muster erzeugt der Scan-Editor Untergruppen (in diesem Fall die fünf Zeilen 1-5) und zeigt sie unterhalb von „Oberste Ebene“ mit dem jeweils in der Gruppe verwendeten Scan-Muster an:

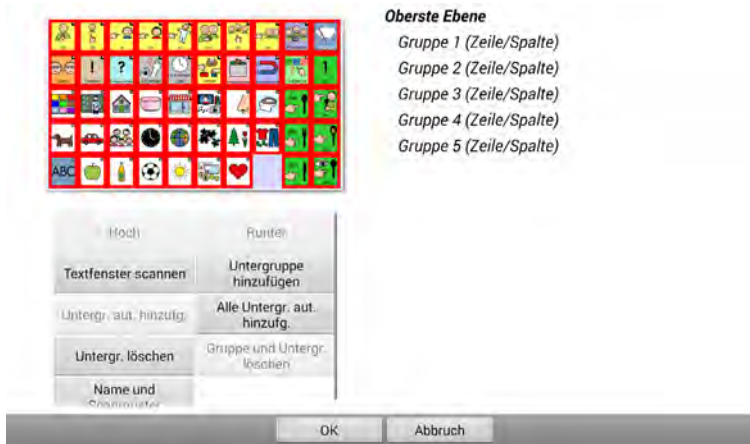

Anzahl und Aufbau der Gruppen hängt ab vom gewählten Scan-Muster (Menü > Einstellungen > Ansteuerung > Scanning > Scan-Muster).

Um eine Gruppe zu sehen, tippen Sie rechts auf den Namen der Gruppe.

Name und Scan-Muster einer Gruppe / Untergruppe bearbeiten

- Tippen Sie auf die Gruppe / Untergruppe, die Sie bearbeiten wollen



- Um das Scan-Muster oder den Namen der Gruppe / Untergruppe zu ändern, wählen Sie **Name und Scan-Modus bearbeiten**.
- Wenn gewünscht, tippen Sie auf **Name** und geben Sie einen Namen für die Gruppe / Untergruppe ein.

Name:


- Wenn gewünscht, ändern Sie das Scan-Muster der Gruppe / Untergruppe



Untergruppe hinzufügen


Sie können Gruppen unterteilen, wenn Sie ihnen zu groß sind oder Tasten unterschiedlicher Funktionalität enthalten.

- Tippen Sie auf die Gruppe / Untergruppe, die Sie in Untergruppen aufteilen möchten.
- Wählen Sie **Untergruppe hinzufügen** aus dem Menü. Die Untergruppe wird unter der Gruppe angezeigt.

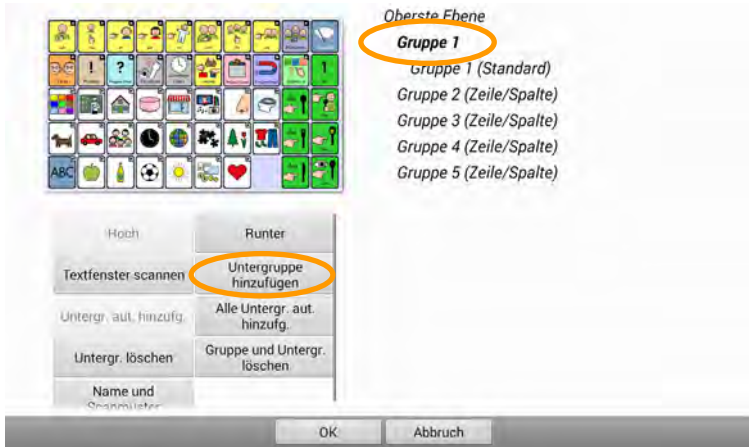

- Die der Gruppe / Untergruppe bisher zugeordneten Tastenfelder werden gelöscht.
- Bearbeiten Sie die Untergruppe, indem Sie rechts auf den Eintrag tippen.
- Markieren Sie dann links auf dem Abbild der Seite links oben im Display alle Tastenfelder, die zur Untergruppe gehören sollen.
- Fügen Sie weitere Untergruppen hinzu, bis alle Tastenfelder Untergruppen angehören.

In diesem Beispiel wird die oberste Zeile der Seite in 2 Gruppen unterteilt: die 8 Personalpronomen sowie die beiden Tasten „Pronomen“ und „Display löschen“.

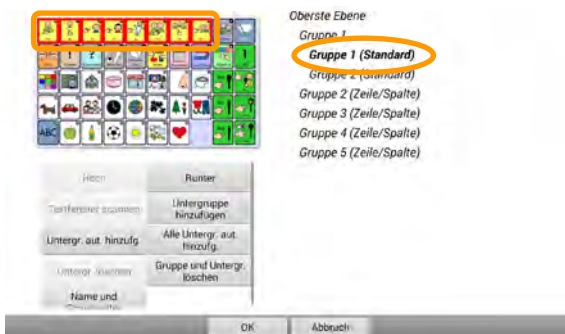

„Gruppe 1“, die die oberste Zeile abdeckt, wird in 2 Untergruppen aufgeteilt. Untergruppe 1 werden die 8 linken Felder der obersten Zeile zugewiesen.



Untergruppe 2 werden die beiden rechten Felder der obersten Zeile zugewiesen.

Tippt man auf die „Gruppe 1“, sieht man, dass alle Felder der obersten Zeile markiert sind. Das bedeutet, dass alle Felder gescannt werden können.

Hinweis: Stellen Sie beim Definieren von Scanmustern sicher, dass alle Tastenfelder einer Seite einer Scangruppe angehören. Nicht enthaltene Felder können sonst nicht erreicht und ausgewählt werden!

Untergruppen automatisch hinzufügen

Diese Option erzeugt automatisch eine Ebene von Untergruppen. Die Anzahl hängt ab vom im Menü „Ansteuerung“ gewählten Scan-Muster.

- Tippen Sie auf die Gruppe / Untergruppe, zu der Sie Untergruppen hinzufügen möchten.
- Wählen Sie **Untergruppen automatisch hinzufügen** aus dem Menü. Die Untergruppen werden unter der aktuellen Gruppe angezeigt.

Alle Untergruppen automatisch hinzufügen

Diese Option erzeugt die maximale Anzahl von Untergruppen. Die Anzahl hängt ab vom im Menü „Ansteuerung“ gewählten Scan-Muster. Jedes Tastenfeld stellt dann eine eigene Gruppe dar.

- Tippen Sie auf die Gruppe / Untergruppe, zu der Sie Untergruppen hinzufügen möchten.
- Wählen Sie **Untergruppen automatisch hinzufügen** aus dem Menü. Die Untergruppen werden unter der aktuellen Gruppe angezeigt.

Untergruppe löschen

Sie können Untergruppen löschen.

- Tippen Sie auf die Gruppe / Untergruppe, die die Untergruppe/n enthält, die Sie löschen wollen.

- Wählen Sie **Untergruppen löschen** aus dem Menü. Die Untergruppe/n wird / werden gelöscht.

Gruppe und Untergruppen löschen

Sie können eine Gruppe samt ihrer Untergruppen löschen.

- Tippen Sie auf die Gruppe, die Sie löschen wollen.
- Wählen Sie **Gruppe und Untergruppen löschen** aus dem Menü. Die Gruppe inkl. sämtlicher Untergruppen wird gelöscht.

Eigenes Scan-Muster entwerfen

Sie können beliebige eigene Scan-Muster entwerfen.

Im folgenden Beispiel wird die Seite in 5 Gruppen unterteilt, die nacheinander gescannt werden. Innerhalb einer Gruppe erfolgt dann die Wahl des Tastenfeldes durch das im Menü „Ansteuerung“ gewählte Scanmuster (Menü > Einstellungen > Ansteuerung > Scanning > Scan-Muster).

- Öffnen Sie den Scan-Editor für die Seite.
- Tippen Sie auf **Oberste Ebene**.
- Sind bereits Gruppen vorhanden, löschen Sie diese durch tippen auf **Untergruppen löschen**.
- Wählen Sie **Untergruppe hinzufügen**.
- Tippen Sie auf **Gruppe 1**.
- Wenn gewünscht, wählen Sie Name und Scanmuster und geben Sie der Gruppe einen geeigneten Namen (hier: „Personalpronomen“).
- Markieren Sie auf dem Abbild der Seite alle Tastenfelder, die zur ersten Gruppe gehören sollen (hier: die Personalpronomen in der obersten Zeile).



Oberste Ebene

Personalpronomen (Zeile/Spalte)


Verben, Adjektive, kleine Wörter (Zeile/Spalte)

Wortfelder (Zeile/Spalte)

Artikel (Zeile/Spalte)

Schrift und Display löschen (Zeile/Spalte)

- Tippen Sie wieder auf **Oberste Ebene**.
- Wählen Sie **Untergruppe hinzufügen**.
- Tippen Sie auf **Gruppe 2**.
- Wenn gewünscht, wählen Sie Name und Scanmuster und geben Sie der Gruppe einen geeigneten Namen (hier: „Verben, Adjektive, kleine Wörter“).
- Markieren Sie auf dem Abbild der Seite alle Tastenfelder, die zur zweiten Gruppe gehören sollen:

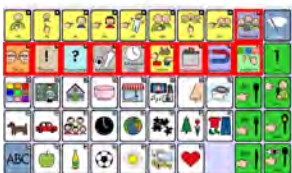

Oberste Ebene

Personalpronomen (Zeile/Spalte)

Verben, Adjektive, kleine Wörter (Zeile/Spalte)

Wortfelder (Zeile/Spalte)

Artikel (Zeile/Spalte)

Schrift und Display löschen (Zeile/Spalte)

- Tippen Sie wieder auf **Oberste Ebene**.
- Wählen Sie **Untergruppe hinzufügen**.
- Tippen Sie auf **Gruppe 3**.

- Wenn gewünscht, wählen Sie Name und Scanmuster und geben Sie der Gruppe einen geeigneten Namen (hier: „Wortfelder“).
- Markieren Sie auf dem Abbild der Seite alle Tastenfelder, die zur dritten Gruppe gehören sollen:



Oberste Ebene

Personalpronomen (Zeile/Spalte)

Verben, Adjektive, kleine Wörter (Zeile/Spalte)

Wortfelder (Zeile/Spalte)

Artikel (Zeile/Spalte)

Schrift und Display löschen (Zeile/Spalte)

- Tippen Sie wieder auf **Oberste Ebene**.
- Wählen Sie **Untergruppe hinzufügen**.
- Tippen Sie auf **Gruppe 4**.
- Wenn gewünscht, wählen Sie Name und Scanmuster und geben Sie der Gruppe einen geeigneten Namen (hier: „Artikel“).
- Markieren Sie auf dem Abbild der Seite alle Tastenfelder, die zur dritten Gruppe gehören sollen:



Oberste Ebene

Personalpronomen (Zeile/Spalte)

Verben, Adjektive, kleine Wörter (Zeile/Spalte)

Wortfelder (Zeile/Spalte)

Artikel (Zeile/Spalte)

Schrift und Display löschen (Zeile/Spalte)

- Tippen Sie wieder auf **Oberste Ebene**.
- Wählen Sie **Untergruppe hinzufügen**.
- Tippen Sie auf **Gruppe 5**.
- Wenn gewünscht, wählen Sie Name und Scanmuster und geben Sie der Gruppe einen geeigneten Namen (hier: „Schrift und Display löschen“).
- Markieren Sie auf dem Abbild der Seite alle Tastenfelder, die zur dritten Gruppe gehören sollen:



Oberste Ebene

Personalpronomen (Zeile/Spalte)

Verben, Adjektive, kleine Wörter (Zeile/Spalte)

Wortfelder (Zeile/Spalte)


Artikel (Zeile/Spalte)

Schrift und Display löschen (Zeile/Spalte)

Hinweis: Stellen Sie beim Definieren von Scanmustern sicher, dass alle Tastenfelder einer Seite einer Scangruppe angehören. Nicht enthaltene Felder können sonst nicht erreicht und ausgewählt werden!

Eigenes Scan-Muster als Standard-Scan-Muster verwenden

Sie können ein individuell erzeugtes Scan-Muster als Standard-Scan-Muster für alle Seiten eines Vokabulars verwenden.

- Entwerfen Sie das Scan-Muster (siehe Seite 74).
- Stellen Sie sicher, dass alle Tastenfelder einer Scangruppe angehören.
- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ** .

Als Standard verwenden
Scanmuster löschen und beend..

- Wählen Sie **Als Standard verwenden**.
- Beantworten Sie die Frage nach dem Überschreiben evtl. vorhandener anderer Scan-Muster mit **Ja**.

Wenn Sie dieses Scanmuster als Standardscanmuster wählen, werden individuelle Scanmuster für einzelne Seiten überschrieben. Fortfahren?	
Ja	Nein


- Das Scan-Muster wird auf allen Seiten des Vokabulars verwendet.

Seiten löschen

Einzelne Seite löschen




Chat-Editor

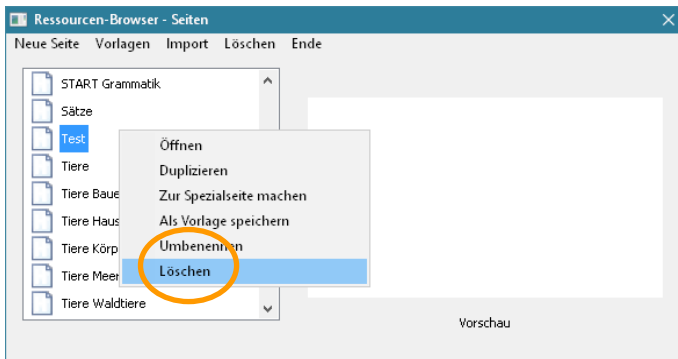
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Öffnen Sie das Menü **Seiten**.
- Linksklicken Sie auf die zu löschende Seite.
- Wählen Sie **Löschen** aus dem Menü.



- Bestätigen Sie die **Löschabfrage**.
- Die Seite wird gelöscht.

NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZU-RÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ** .
- Öffnen Sie das Menü **Seiten**.
- Tippen Sie auf die zu löschende Seite.
- Wählen Sie **Löschen** aus dem Menü.

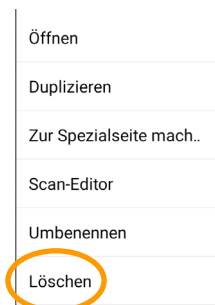


- Bestätigen Sie die **Löschabfrage**.
- Die Seite wird gelöscht.


Mehrere Seiten löschen

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Öffnen Sie das Menü **Seiten**.

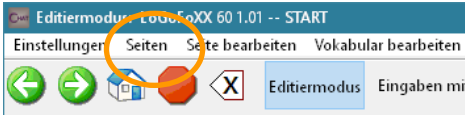

- Wählen Sie die Option **Löschen**.

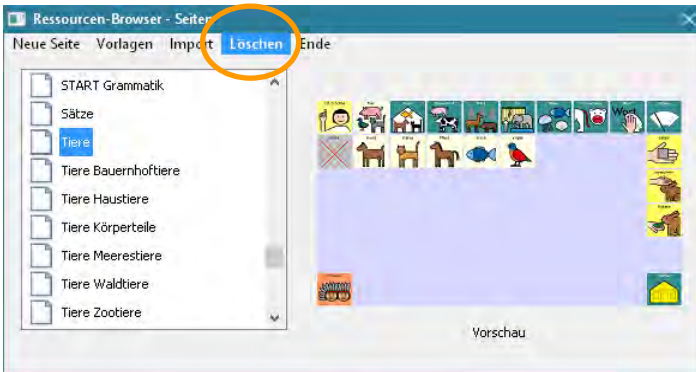






- Das Fenster **Mehrere Seiten löschen** wird angezeigt.
- **Markieren** Sie alle Seiten, die Sie löschen wollen. Klicken Sie dazu jeweils in das kleine Kästchen links neben dem Namen der Seite.



- Klicken Sie auf **OK**, um die ausgewählten Seiten zu löschen.
- Bestätigen Sie die **Löschabfrage**.
- Die Seiten werden gelöscht.

NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ** .
- Wählen Sie das Menü **Seiten**.
- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ** .

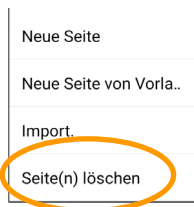

- Wählen Sie das Menü **Seite(n) löschen**
- Tippen Sie auf die Seiten, die Sie löschen wollen. Die Seiten werden zum Löschen markiert.
- Tippen Sie erneut auf eine Seite, um die Markierung wieder zu entfernen.



- Tippen Sie auf **Löschen**.
- Bestätigen Sie die **Löschabfrage**.
- Die Seiten werden gelöscht.


TASTEN BEARBEITEN

Taste bearbeiten



Die Chat-Software bietet zahlreiche Möglichkeiten der Gestaltung der einzelnen Tastenfelder.


Chat-Editor

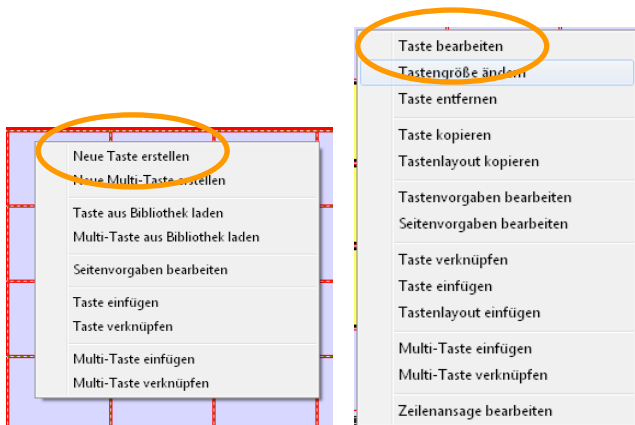- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, die Sie bearbeiten wollen.
- Wollen Sie ein leeres Tastenfeld bearbeiten, wählen Sie **Neue Taste erstellen**.
- Wollen Sie ein bestehendes Tastenfeld bearbeiten, wählen Sie **Taste bearbeiten**.



NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Drücken und halten Sie auf der Taste, die Sie bearbeiten wollen.
- Wollen Sie ein leeres Tastenfeld bearbeiten, wählen Sie **Neue Taste erstellen**.
- Wollen Sie ein bestehendes Tastenfeld bearbeiten, wählen Sie **Taste bearbeiten**.

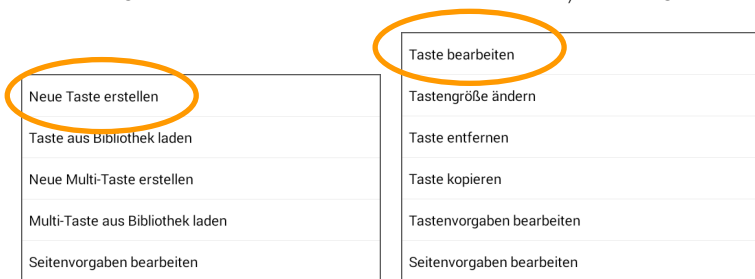

Der Dialog zum Gestalten von Tasten wird angezeigt.

Tasteneigenschaften – Allgemein

Chat-Editor

Wählen Sie den Reiter **Allgemein**.

The screenshot shows a dialog box titled 'Tasteneigenschaften' with a close button (X) in the top right corner. At the top, there are buttons for 'OK' and 'Abbruch'. Below these are three tabs: 'Allgemein', 'Layout', and 'Funktion', with 'Allgemein' being the active tab. The 'Allgemein' tab contains the following fields and controls:

- 'Name' field with a 'Bearb.' (Edit) button to its right.
- 'Label' field with a 'Nächste' (Next) button to its right.
- 'Mitteilung' (Message) text area.
- A section titled 'Symbol / Bild' (Symbol / Image) containing a vertical stack of buttons: 'Suchen' (Search), 'Auswählen' (Select), 'Entfernen' (Remove), 'Import', and 'Name'.
- A large square area with a gray and white checkerboard pattern, representing the button's image.

Name

Der Name einer Taste dient dem Wiederfinden der Taste in der Bibliothek. Standardmäßig wird das beim ersten Gestalten der Taste eingegebene Label verwendet. Unter diesem Namen können Sie die Taste dann in der Bibliothek finden. Mit der Taste „Bearb.“ kann der Name geändert werden.

Label


Geben Sie den Text ein, der ober- oder unterhalb des Bildes auf der Taste angezeigt werden soll. Das Label wird standardmäßig in das Feld „Mitteilung“ übertragen. Soll die Taste nur ein Bild anzeigen und keinen Text, lassen Sie das Feld „Label“ leer.

Mitteilung



Geben Sie den Text ein, den die Taste als Mitteilung wiedergeben soll. Standardmäßig wird der bei „Label“ eingetragene Text in das Feld „Mitteilung“ übertragen. Soll die Taste keinen Text ausgeben, lassen Sie das Feld „Mitteilung“ leer.

Symbol / Bild


- Wählen Sie **Symbol / Bild – Suchen**, um ein Symbol bzw. Bild mit Hilfe der Suchfunktion auszuwählen. Das Tastenlabel wird automatisch als Suchbegriff übernommen, dieser kann aber auch manuell eingegeben werden. Jedes Vorkommnis des gesuchten Begriffs wird angezeigt, d.h. suchen Sie nach „und“, werden auch Bilder angezeigt, die „Hund“ und „Mund“ heißen. Hinter jedem Symbol steht der Symbolsatz, aus dem es stammt. Klicken Sie auf ein Symbol, um es zu betrachten. Wählen Sie **Auswahl**, um das aktuelle Symbol zu übernehmen.

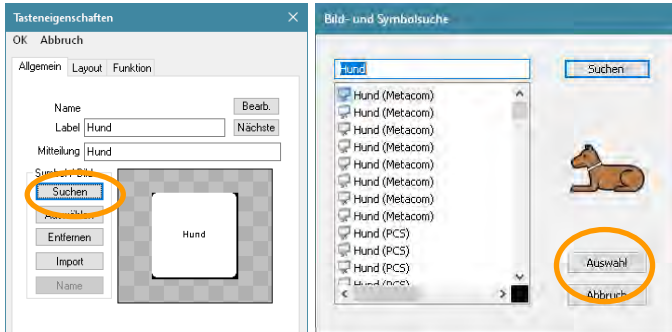


- Wählen Sie **Symbol / Bild – Auswählen**, um ein Bild manuell auszuwählen.
- Wählen Sie den gewünschten Symbolsatz.
- Wählen Sie die Kategorie.
- Klicken Sie auf ein Symbol, um die Vorschau zu sehen
- Wählen Sie **Auswahl**, um das aktuelle Symbol auszuwählen.

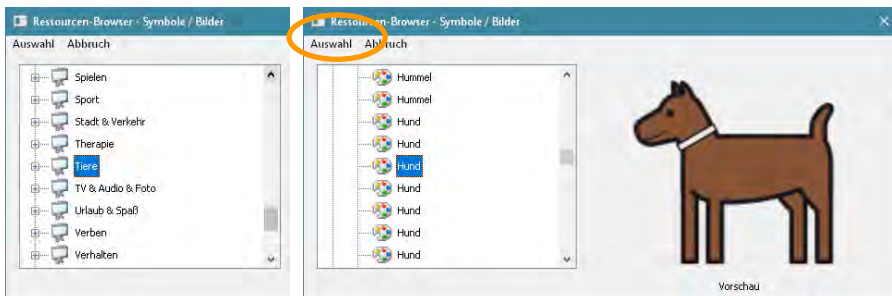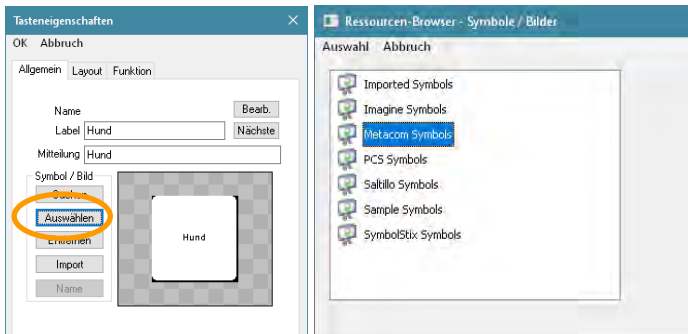

- Wählen Sie **Symbol / Bild – Entfernen**, um das der Taste derzeit zugewiesene Bild zu entfernen.
- Wählen Sie **Symbol / Bild – Import**, um ein auf dem PC vorhandenes Bild (Grafik, Symbol, Foto) zu importieren.

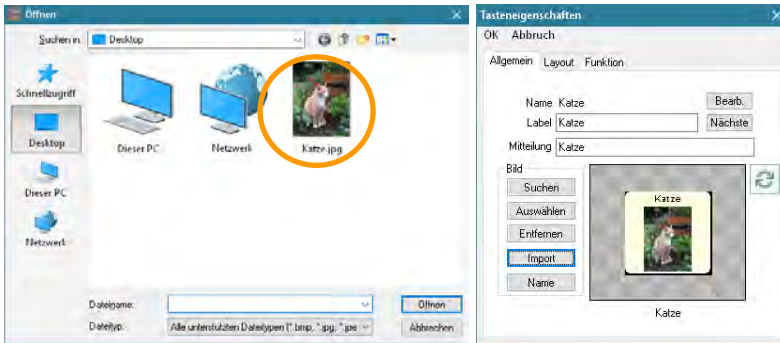


- Wählen Sie **Symbol / Bild – Name**, um den Bildnamen zu ändern.
- Wählen Sie  um das Bild jeweils um 90° im Uhrzeigersinn zu drehen.

Weitere Optionen im Menü **Tasteneigenschaften – Allgemein**:

Nächste

Öffnet die nächste Taste (die Taste rechts von der aktuellen Taste) zum Bearbeiten.

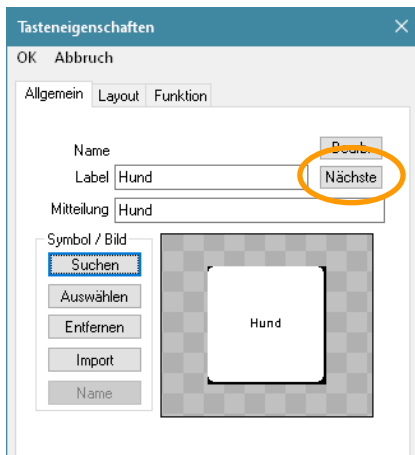

NovaChat-Gerät

Wählen Sie den Reiter **Allgemein**.



The screenshot shows the 'Allgemein' (General) tab of the NovaChat-Gerät configuration window. The 'Allgemein' tab is highlighted with an orange circle. The window contains the following elements:

- Label:** A text input field for the label of the button.
- Mitteilung:** A text input field for the message displayed on the button.
- Bild:** A section for the button image, including buttons for 'Import', 'Kamera', 'Laden', and 'Entf.', and a checkbox for 'Sichtbar' (Visible).
- Name bearbeiten:** A button in the top right corner to edit the button's name.
- Kein Bild:** A placeholder image showing a yellow square with the text 'Kein Bild' below it.
- OK / Abbruch:** Buttons at the bottom for confirming or canceling the changes.

Label

Geben Sie den Text ein, der ober- oder unterhalb des Bildes auf der Taste angezeigt werden soll. Das Label wird standardmäßig in das Feld „Mitteilung“ übertragen. Soll die Taste nur ein Bild anzeigen und keinen Text, lassen Sie das Feld Label leer.

Mitteilung

Geben Sie den Text ein, den die Taste als Mitteilung wiedergeben soll. Soll die Taste keinen Text ausgeben, lassen Sie das Feld Mitteilung leer.

Name bearbeiten

Der Name einer Taste dient dem Wiederfinden der Taste. Standardmäßig wird das beim ersten Gestalten der Taste eingegebene Label verwendet. Unter diesem Namen können Sie die Taste dann in den Ressourcen finden. Mittels „Name bearbeiten“ kann der Name später geändert werden.

Bild


- Wählen Sie **Bild – Laden**, um ein Bild manuell oder mit Hilfe der Suchfunktion auszuwählen. Das Tastenlabel wird automatisch als Suchbegriff übernommen, dieser kann aber auch manuell eingegeben werden.




- Wollen Sie ein Symbol manuell aussuchen, wählen Sie zunächst den Symbolsatz, den Sie verwenden möchten.





- Wählen Sie die Kategorie.

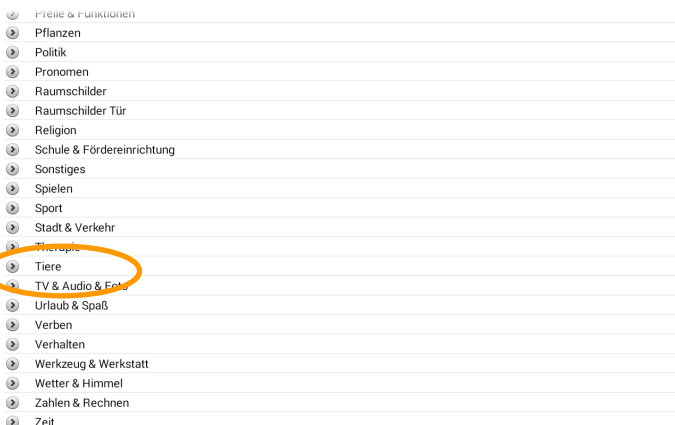

- Wählen Sie ein Symbol.

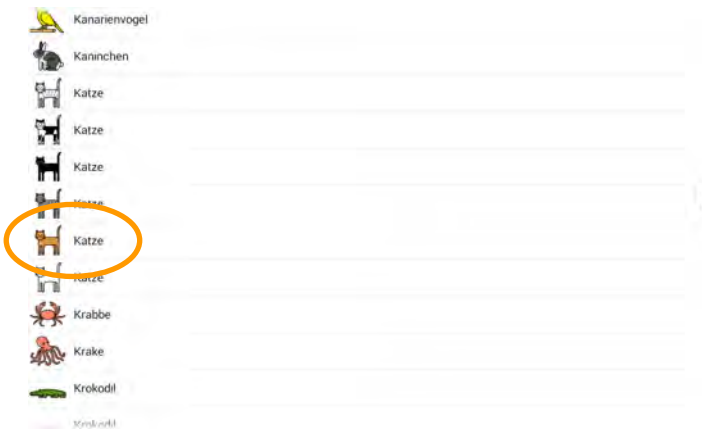

- Wählen Sie stattdessen **Suchen**, um nach dem Begriff über alle Symbolsysteme zu suchen. Der Suchbegriff muss als ganzes Wort im Symbol vorkommen.

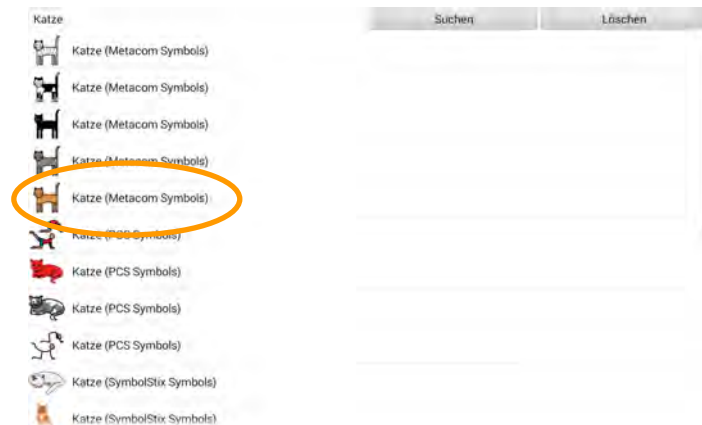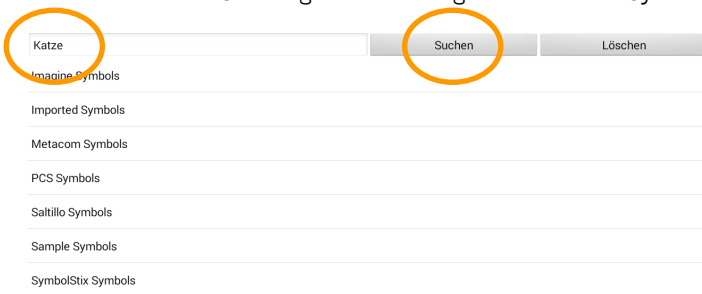

- Wischen Sie ggf. nach oben bzw. unten, um in der Liste der Bilder zu scrollen.
- Tippen Sie auf ein Symbol, um es auszuwählen.


Tippen Sie auf **Entf.**, um das der Taste derzeit zugewiesene Bild zu entfernen.




Wählen Sie **Import**, um ein auf dem Tablet vorhandenes Bild zu importieren.



- Auf dem Tablet vorhandene Bilder werden angezeigt:

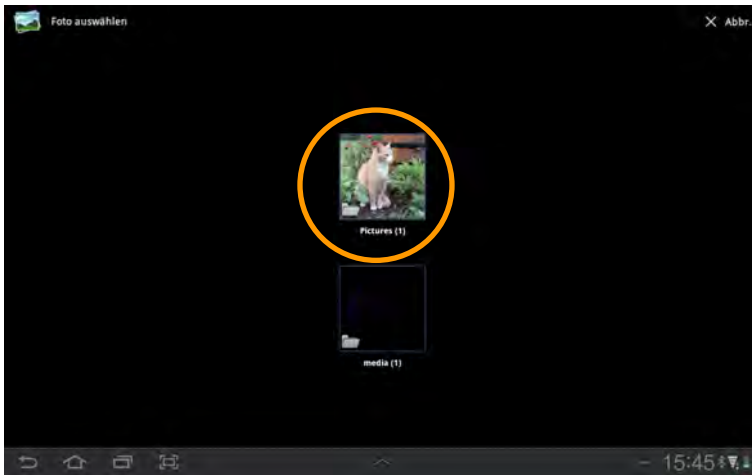


- Tippen Sie auf das Bild, um es auszuwählen.
- Geben Sie dem Bild einen Namen:

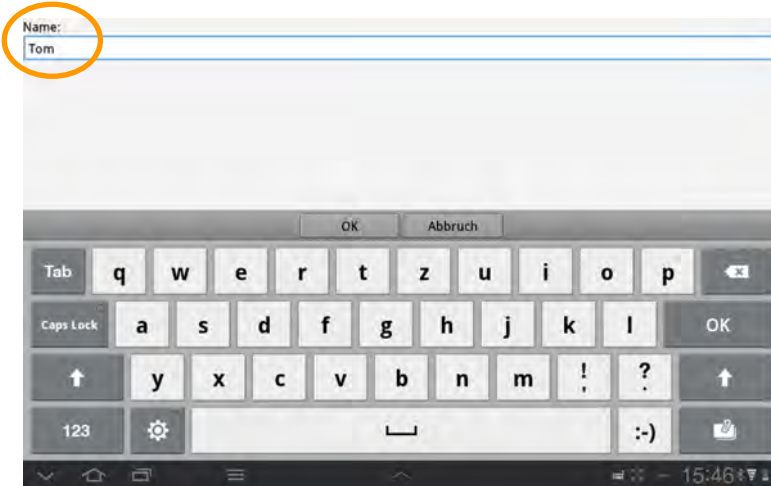

- Das Bild wird auf der Taste angezeigt.




- Wählen Sie **Kamera**, um mit der im Tablet eingebauten Kamera ein Foto zu machen.

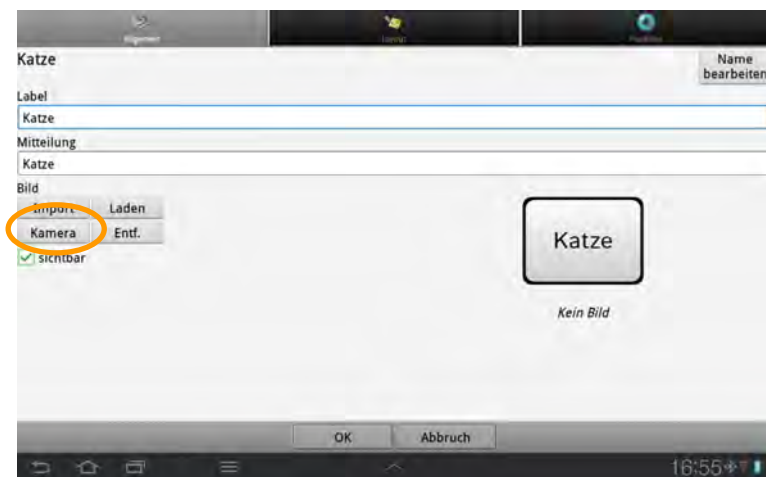

- Die Kamera-App des Tablets wird gestartet:



- Tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto zu machen.
- Tippen Sie auf Speichern, um das Bild zu speichern.
- Geben Sie einen Namen für das Foto ein, oder übernehmen Sie den Vorschlag.

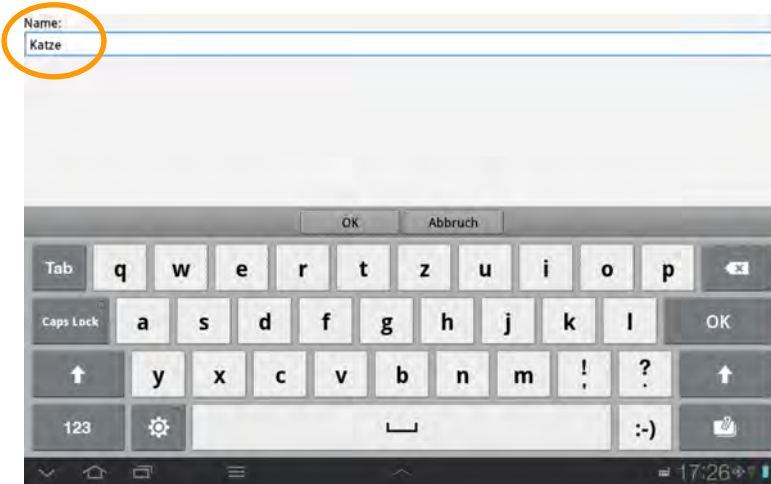

- Das Bild wird auf der Taste angezeigt.



Weitere Optionen im Menü Tasteneigenschaften – Allgemein:


Sichtbar

- Legen Sie fest, ob die Taste im Benutzermodus angezeigt wird.

Tasteneigenschaften – Layout

Chat-Editor

Wählen Sie den Reiter **Layout**.

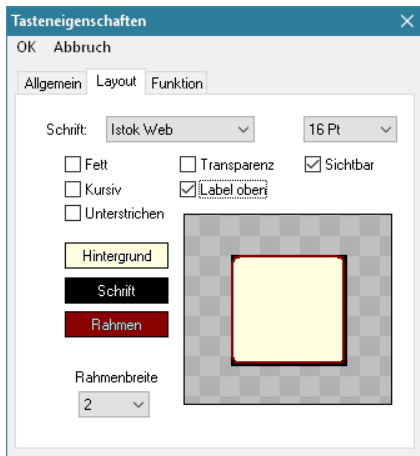

Schrift

- Wählen Sie Schriftart und Schriftgröße für das Tastenlabel. Je größer die Schrift, desto kleiner wird das Bild angezeigt.



Fett, Kursiv, Unterstrichen

- Wählen Sie Schriftattribute für das Tastenlabel.




Transparenz

- Das Bild wird vor leerem Hintergrund angezeigt.



Label oben

- Das Tastenlabel wird oberhalb des Bildes angezeigt.

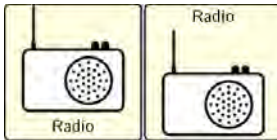


Sichtbar

- Die Taste wird im Benutzermodus nicht angezeigt.



Hintergrundfarbe

- Wählen Sie eine Farbe für den Hintergrund (entfällt bei transparenter Taste).

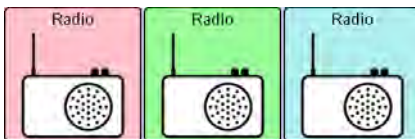

Schriftfarbe

- Wählen Sie eine Farbe für das Tastenlabel.



Rahmenfarbe

- Wählen Sie eine Farbe für den Rahmen um die Taste (entfällt bei transparenter Taste und bei Rahmenbreite 0 Pt).




Rahmenbreite

- Wählen Sie eine Stärke für den Tastenrahmen. Je größer der Wert ist, je kleiner werden Tastensymbol und -label angezeigt.



NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf den Reiter **Layout**.

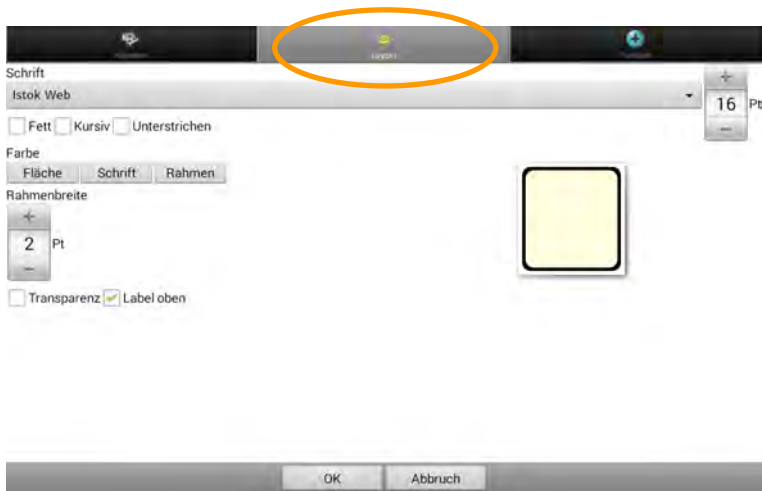

Schrift

- Wählen Sie Schriftart und Schriftgröße für das Tastenlabel.




Fett, Kursiv, Unterstrichen

- Wählen Sie Schriftattribute für das Tastenlabel.



Farbe – Fläche

- Wählen Sie eine Farbe für den Hintergrund (entfällt bei transparenter Taste).

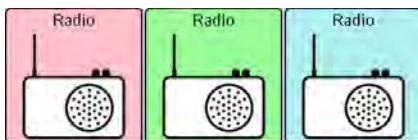

Farbe – Schrift

- Wählen Sie eine Farbe für das Tastenlabel.




Farbe – Rahmenfarbe

- Wählen Sie eine Farbe für den Rahmen um die Taste (entfällt bei transparenter Taste und bei Rahmenbreite 0 Pt).



Rahmenbreite

- Wählen Sie eine Stärke für den Tastenrahmen (0 - 7 Pt).

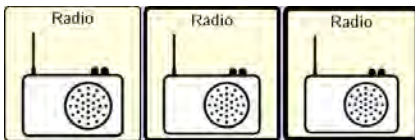


Transparenz

- Das Bild wird vor leerem Hintergrund angezeigt.



Label oben


- Das Tastenlabel wird oberhalb des Bilds angezeigt.

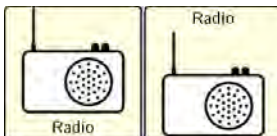



Tasteneigenschaften – Funktion

Chat-Editor

Hier können Sie der Taste eine oder mehrere Funktionen zuweisen. Alle einer Taste zugewiesenen Funktionen werden ausgeführt, sobald die Taste aktiviert wird. Eine Übersicht über die Funktionen finden Sie ab Seite 100.

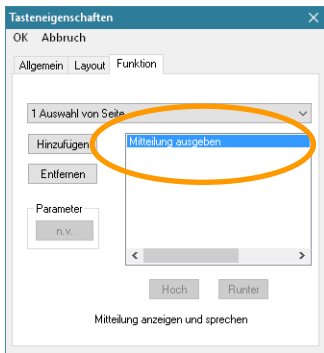

Standardmäßig ist die Funktion „Mitteilung ausgeben“ enthalten. Sie sorgt dafür, dass die der Taste zugewiesene Mitteilung im Textfenster angezeigt und gesprochen wird. Wollen Sie eine andere Funktion ausführen oder weitere Funktionen hinzufügen, so öffnen Sie die Auswahlliste:

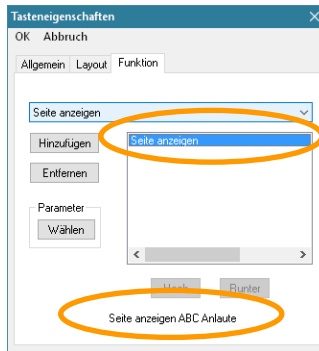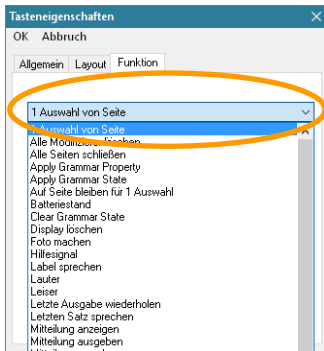

Öffnen Sie das Drop.-Down-Menü. Klicken Sie auf die gewünschte Funktion und klicken Sie auf **Hinzufügen**.


Manche Funktionen haben zusätzliche Parameter, z.B. die anzuzeigende Seite bei der Funktion „Seite anzeigen“. Wollen Sie beispielsweise eine andere Seite anzeigen, so brauchen Sie die Funktion nicht zu löschen. Markieren Sie sie einfach und klicken Sie auf **Parameter wählen**, um eine andere Seite auszuwählen.

Haben Sie der Taste mehr als eine Funktion zugewiesen, so können Sie mit Hilfe der Tasten **hoch** und **runter** die Reihenfolge ändern, in der die Funktionen abgearbeitet werden.

Wollen Sie eine zugewiesene Funktion entfernen, markieren Sie sie und wählen Sie dann **Entfernen**.

NovaChat-Gerät

Tippen Sie auf den Reiter „Funktion“. Hier können Sie der Taste eine oder mehrere Funktionen zuweisen. Alle einer Taste zugewiesenen Funktionen werden ausgeführt, sobald die Taste aktiviert wird.

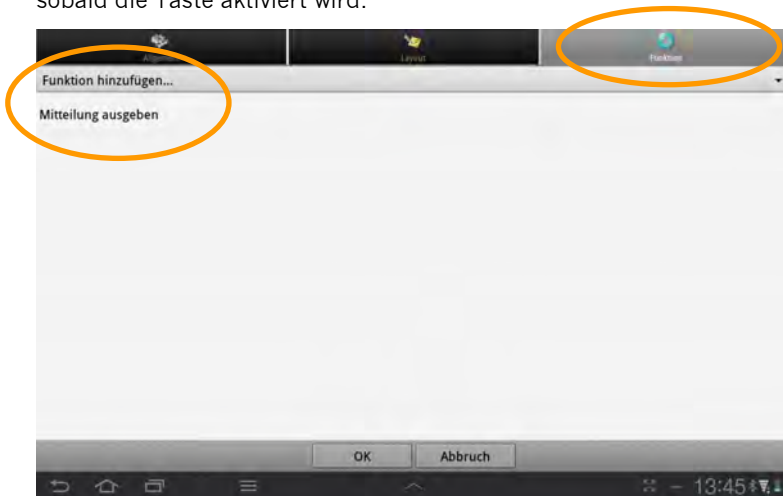

Standardmäßig ist die Funktion „Mitteilung ausgeben“ enthalten. Sie sorgt dafür, dass die der Taste zugewiesene Mitteilung im Textfenster angezeigt und gesprochen wird. Wollen Sie eine andere Funktion ausführen oder weitere Funktionen hinzufügen, so tippen Sie auf „Funktion hinzufügen“, um die Auswahlliste zu öffnen:



Bearbeiten
Hoch
Runter
Entfernen

Wählen Sie die gewünschte Funktion durch Tippen aus. Eine Übersicht über die Funktionen finden Sie ab Seite 100.

Haben Sie der Taste mehr als eine Funktion zugewiesen, so können Sie die Reihenfolge ändern, in der die Funktionen abgearbeitet werden. Weiterhin können Sie Funktionen entfernen. Tippen Sie auf die Funktion, deren Reihenfolge Sie ändern oder die Sie entfernen wollen, und das Kontextmenü wird angezeigt. Wählen Sie **Hoch**, **Runter** oder **Entfernen**. Hat die Funktion einen Parameter, so können Sie diesen direkt **bearbeiten**.

Übersicht Tasten- & Gestenfunktionen

Keine Funktion (nur auf dem Gerät): keine Funktion

1 Auswahl von Seite: öffnet eine Seite für die Auswahl einer Taste, danach erfolgt automatisch der Rücksprung zur vorigen Seite (siehe S. 54)

Alle Modifizierer löschen: löscht alle noch gesetzten Modifizierer (siehe Multi-Taste ab S. 117)

Alle Seiten schließen: schließt alle über die Funktion „1 Auswahl von Seite“ geöffneten Seiten

Android-Anwendung öffnen (nur auf dem Gerät): ermöglicht das Ausführen einer auf dem Tablet vorhandenen Android-App (siehe S. 140). Diese Funktion steht nur auf dem Gerät und nicht im Chat-Editor zur Verfügung. Diese Funktion steht auf einem Gerät, das als geschlossene Anlage konfiguriert wurde, nicht zur Verfügung.

Audiodatei abspielen (nur auf dem Gerät): ermöglicht die Wiedergabe einer auf dem Gerät vorhandenen Audiodatei. Die Auswahl der Audiodatei erfolgt zusammen mit dem Speichern des Befehls.

Audiodatei abspielen beenden (nur auf dem Gerät): beendet die Wiedergabe der Audiodatei.

Auf Seite bleiben für 1 Auswahl: verhindert den Rücksprung zur vorigen Seite von einer nur für eine Auswahl geöffneten Seite. Der Rücksprung erfolgt erst nach einer weiteren Auswahl.

Batteriestand: Anzeige der verbleibenden Kapazität der Akkus im Textfenster und per Sprachausgabe

Display löschen: löscht den Inhalt des Textfensters

Fertig: Entspricht der Taste „Senden“ im Textfenster beim Verfassen einer Text-Nachricht (SMS).

Foto machen: öffnet die Tablet-eigene Foto-App zum direkten Anfertigen eines Fotos mit der internen Kamera

Hilfesignal: aktiviert einen Rufton, der genutzt werden kann, um Hilfe zu rufen

Internetbefehl (Webhook): Möglichkeit, Tasten mit über das Internet zu versenden- den Befehlen (z. B. E-Mail verschicken, Google-Docs erzeugen, Smarthome-Anwendung auslösen) zu belegen. Wird derzeit von PRD nicht unterstützt.

Label sprechen: das Tastenlabel wird gesprochen

Lauter: erhöht die Lautstärke um eine Stufe

Leiser: verringert die Lautstärke um eine Stufe

Letzte Ausgabe wiederholen: wiederholt die letzte Sprachausgabe

Letzten Satz sprechen: wiederholt den letzten Satz

Letztes Wort sprechen: wiederholt das zuletzt eingegebene Wort

Mitteilung anzeigen: die zur Taste gehörende Mitteilung wird im Textfenster angezeigt, aber nicht gesprochen

Mitteilung ausgeben: die zur Taste gehörende Mitteilung wird angezeigt und gesprochen

Mitteilung sprechen: die zur Taste gehörende Mitteilung wird gesprochen, aber nicht im Textfenster angezeigt

Modifizierer anwenden: setzt einen der 50 Modifizierer (siehe S. 117)

Nächstes Wort abwandeln: deklinierbare und konjugierbare Wörter werden in der gewählten Form angezeigt (siehe S. 141)

Profil wählen: ermöglicht das Auswählen eines Benutzerprofils (siehe S. 214)

Scanning stoppen: stoppt das Scanning

Seite anzeigen: wechselt zu einer Seite (siehe S. 53)

SMS – Kontakt: zeigt einen Kontakt auf der als „SMS-Kontakte“ markierten Seite an

SMS – Nachrichtendetails: zeigt die ausgewählte Nachricht auf der als „SMS-Nachrichtendetails“ markierten Seite

SMS – Nachricht kopieren: kopiert die aktuell ausgewählte Nachricht

SMS – Nachricht löschen: löscht die aktuell ausgewählte Nachricht

SMS – Nachricht vorlesen: liest die aktuell ausgewählte Nachricht vor

SMS – Neue Nachricht: ermöglicht das Verfassen einer Textnachricht. Ist eine Unterhaltung / eine Nachricht ausgewählt, wird der Absender als Empfänger verwendet, ansonsten erfolgt der Sprung zu der als „SMS-Kontakte“ markierten Seite zur Auswahl des Empfängers.

SMS – Seite Kontakte anzeigen: wechselt zu der als „SMS-Kontakte“ markierten Seite

SMS – Seite Nachrichten anzeigen: wechselt zu der als „SMS-Nachrichten“ markierten Seite

SMS – Seite Nachrichtendetails anzeigen: wechselt zu der als „SMS-Nachrichtendetails“ markierten Seite

SMS – Seite Unterhaltungen anzeigen: wechselt zu der als „SMS-Unterhaltungen“ markierten Seite

SMS – Teilnehmer: zeigt die Teilnehmer der ausgewählten SMS-Unterhaltung an

SMS – Textfenster als SMS senden: sendet den aktuellen Inhalt des Textfensters als SMS an den aktuell aktiven SMS-Kontakt.

SMS – Unterhaltung löschen: löscht die aktuell ausgewählte Unterhaltung. Sämtliche Nachrichten der Unterhaltung werden gelöscht!

SMS – Vorige: zeigt die vorige Seite mit Unterhaltungen/Nachrichten/Kontakten an

SMS – Weitere: zeigt die nächste Seite mit Unterhaltungen/Nachrichten/Kontakten an

SMS – Zu Kontakten hinzufügen: fügt den Absender der aktuellen Unterhaltung zu den Kontakten hinzu.

Sound aufnehmen: ermöglicht die Aufnahme einer Sound-Datei (siehe S. 133)

Sound wiedergeben: ermöglicht die Wiedergabe einer Sound-Datei (siehe S. 129)

Sprachdatenaufzeichnung ein/aus: schaltet die Sprachdatenaufzeichnung ein bzw. aus

Sprache ein/aus: wechselt zwischen Sprachausgabe aus und voriger Lautstärke

Sprechen: spricht den aktuellen Inhalt des Textfensters

Springe zu Seite: öffnet eine Seite für die Auswahl einer Taste, danach erfolgt automatisch der Rücksprung zur Startseite.

Startseite anzeigen: springt zur Startseite des aktuellen Vokabulars

Stopp: bricht die aktuelle Sprachausgabe ab

Text auf Taste speichern: ermöglicht das Speichern des aktuellen Inhalts des Textfenster auf einer Taste (siehe S. 163)

Textfenster – Text einfügen: der in der Zwischenablage vorhandene Text wird in das Textfenster eingefügt (siehe S. 166)

Textfenster – Text kopieren: der im Textfenster vorhandene Text wird in die Zwischenablage kopiert (siehe S. 166)

Textfenster – Text teilen: der im Textfenster vorhandene Text wird an eine der im NovaChat-Gerät für „Teilen“ geeigneten Anwendungen geschickt (siehe S. 166)

Textfenster laden: ermöglicht das Laden eines Textes aus einer Datei zur direkten Anzeige im Textfenster (siehe S. 165)

Textfenster speichern: ermöglicht das Speichern des aktuellen Inhalts des Textfensters in einer Datei (siehe S. 164)

Videodatei abspielen (nur auf dem Gerät): ermöglicht die Wiedergabe einer auf dem Gerät gespeicherten Videodatei. Die Auswahl der Videodatei erfolgt zusammen mit dem Speichern des Befehls.

Vorige Seite anzeigen: springt zur vorigen Seite zurück

Wort abwandeln: erlaubt das nachträgliche Deklinieren und Konjugieren von Verben, Nomen, Adjektiven und Pronomen (siehe S. 141)

Wortart zuweisen: haben Sie mit diesem Befehl einer Taste eine bestimmte Wortart (Adjektiv, Nomen oder Verb) zugewiesen, kann das zugehörige Wort mit der Funktion „Nächstes Wort abwandeln“ gebeugt werden, bevor die Taste ausgewählt wird. Die gebeugte Form wird als Tastenlabel angezeigt, wenn die Funktion „Dynamische Label“ aktiviert ist (siehe S. 141)

Wortform zurücksetzen: haben Sie ein flektierbares Wort mit dem Befehl „Nächstes Wort abwandeln“ dynamisch gebeugt, so können Sie die Beugung mit diesem Befehl wieder zurücksetzen. Alle entsprechenden Wörter werden wieder in der Grundform angezeigt.

Wort löschen: löscht das Wort links vom Cursor

Wortsuche (nur auf dem Gerät): durchsucht das Vokabular nach dem letzten Wort im Textfenster. Die Anzeige kann im Menü Einstellungen - Wortsuche konfiguriert werden (siehe S. 210). Diese Funktion steht nur auf dem Gerät und nicht im Chat-Editor zur Verfügung. **Hinweis:** die Wortsuche funktioniert aus technischen Gründen nicht mit Multi-Tasten.

Wortvorhersage: macht die Taste zum Vorschlagsfeld für die Wortvorhersage. Wählen Sie, welcher der zehn Vorschläge angezeigt werden soll (siehe S. 202).

Zeichen löschen: löscht das Zeichen links vom Cursor

Zeichenvorhersage: macht die Taste zum Vorschlagsfeld für die Zeichenvorhersage. Wählen Sie, welcher der zehn Vorschläge angezeigt werden soll (siehe S. 202).

Zeit/Datum anzeigen: Zeit und/oder Datum werden im Textfenster angezeigt und gesprochen. Wählen Sie die gewünschte Ausgabe:



Zeit und Datum: Es ist der 14. Oktober 2019, 10:40

Datum: Heute ist der 14. Oktober 2019

Zeit: Es ist 10:40

Tastenmakro (mehrere Funktionen ausführen)


Der NovaChat bietet die Möglichkeit, einer Taste mehrere Funktionen zuzuweisen. Sämtliche zugewiesene Funktionen werden beim Betätigen der Taste nacheinander abgearbeitet. Man spricht von einem „Tastenmakro“.

Eine Taste könnte z. B. folgende 3 Funktionen enthalten:

- Das Textfenster wird gelöscht.
- Die Aussage „Was möchten Sie zu trinken haben? Ich hätte...“ wird gesprochen.
- Es wird auf die Seite „Getränke“ gewechselt, um dort weitere Wörter abzurufen.



Einer Taste auf dem Chat-Editor ein Makro zuweisen

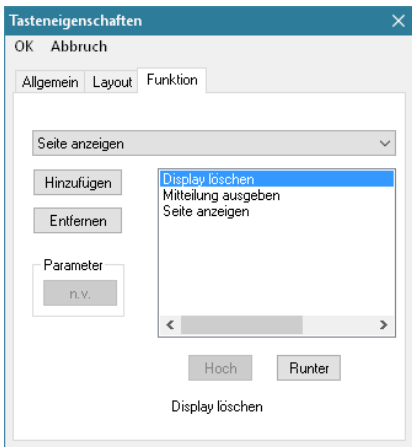
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, die das Makro enthalten soll.
- Wählen Sie **Taste bearbeiten**.
- Geben Sie die gewünschte Mitteilung ein, z.B.: „Was möchten Sie zu trinken haben? Ich hätte“.
- Gestalten Sie die Taste nach Ihren Wünschen (Reiter *Allgemein* und *Layout*).
- Wählen Sie den Reiter **Funktion**.
- Die Funktion **Mitteilung ausgeben** ist bereits hinterlegt. Öffnen Sie die Auswahlliste und wählen Sie die Funktion **Display löschen**. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- Öffnen Sie die Auswahlliste und wählen Sie die Funktion **Seite anzeigen**. Klicken Sie auf **hinzufügen**.
- Der Ressourcen-Browser zeigt die vorhandenen Seiten an. Wählen Sie die Seite (z.B. **TRINKEN**) und bestätigen Sie mit **Auswahl**.
- Um die Reihenfolge der Funktionen zu ändern, markieren Sie eine Funktion und wählen Sie dann **hoch** oder **runter**. Platzieren Sie „Display löschen“ ganz oben.
- Um eine Funktion zu löschen, markieren Sie die Funktion und wählen Sie dann **Entfernen**.
- Manche Funktionen haben weitere Parameter (z.B. gehört zu **Seite anzeigen** die anzuzeigende Seite). Markieren Sie eine Funktion, um die zugehörigen Parameter angezeigt zu bekommen. Wählen Sie **Parameter**, um den Parameter zu ändern.



- Wählen Sie OK, wenn Sie alle Funktionen des Makros eingegeben haben.

Einer Taste auf dem NovaChat-Gerät ein Makro zuweisen

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und Halten Sie die Taste, die das Makro enthalten soll.
- Wählen Sie **Taste bearbeiten** aus dem Kontextmenü.
- Geben Sie die gewünschte Mitteilung ein, z.B.: „Was möchten Sie zu trinken haben? Ich hätte“.
- Gestalten Sie die Taste nach Ihren Wünschen (Reiter *Allgemein* und *Layout*).
- Wählen Sie den Reiter **Funktion**.
- Die Funktion **Mitteilung ausgeben** ist bereits hinterlegt. Tippen Sie auf **Funktion hinzufügen...**, um die Auswahlliste zu öffnen. Wählen Sie die Funktion **Display löschen**. Die Funktion wird hinzugefügt.
- Tippen Sie erneut auf **Funktion hinzufügen...**, um die Auswahlliste zu öffnen. Wählen Sie die Funktion **Seite anzeigen**.
- Der Ressourcen-Browser zeigt die vorhandenen Seiten an. Wählen Sie die Seite (z.B. **TRINKEN**) und bestätigen Sie mit **OK**.
- Um die Reihenfolge der Funktionen zu ändern, tippen Sie auf eine Funktion und wählen Sie dann **hoch** oder **runter**. Platzieren Sie „Display löschen“ ganz oben.
- Um eine Funktion zu löschen, tippen Sie auf die Funktion und wählen Sie dann **entfernen**.
- Manche Funktionen haben weitere Parameter (z.B. gehört zu **Seite anzeigen** die anzuzeigende Seite). Markieren Sie eine Funktion, um die zugehörigen Parameter angezeigt zu bekommen. Wählen Sie **Parameter**, um den Parameter zu ändern.

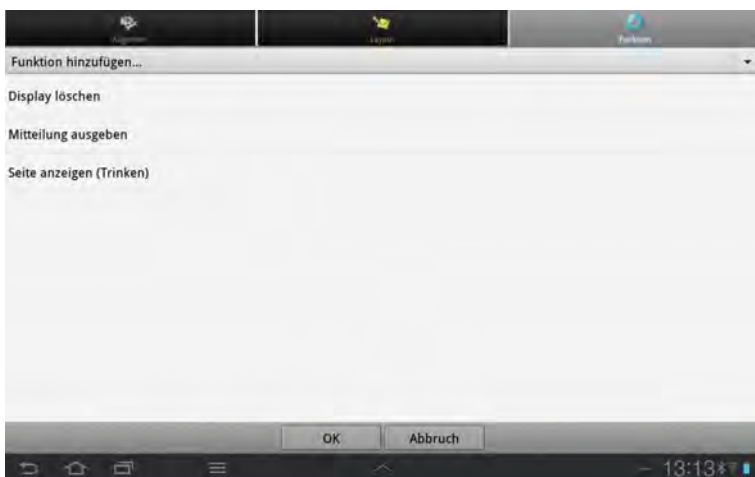

- Wählen Sie **OK**, wenn Sie alle Funktionen des Makros eingegeben haben.

Taste mehrfach verwenden


Eine einmal erstellte Taste kann mehrfach auf derselben oder auf anderen Seiten verwendet werden. Der NovaChat verfügt über mehrere Arten, eine Taste mehrfach zu verwenden.

Taste aus Bibliothek laden


Alle existierenden Tasten sind in der Bibliothek vorhanden.

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der zu belegenden Taste.
- Wählen Sie **Taste aus Bibliothek laden**. Der Ressourcen-Browser öffnet sich.

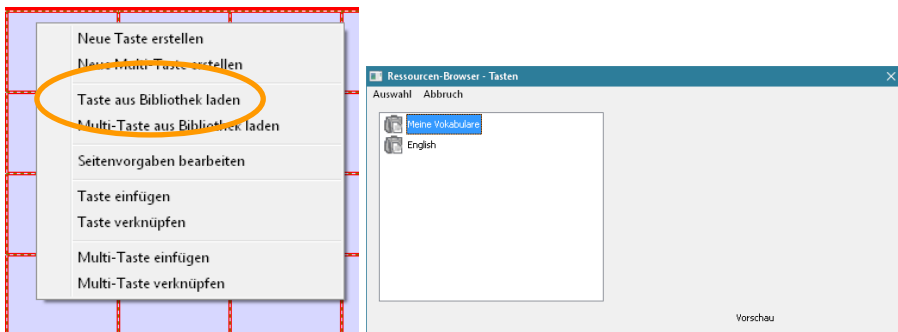

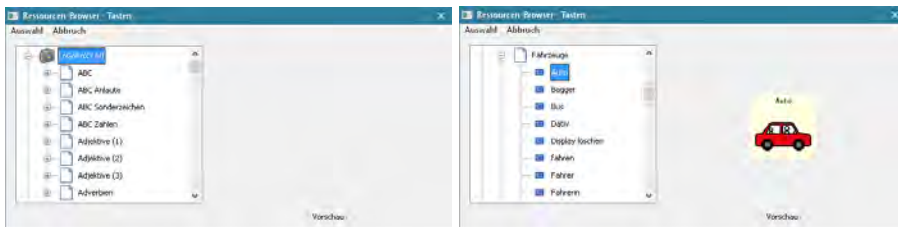

- Wählen Sie im Ressourcen-Browser das Vokabular aus, das die Taste enthält, die Sie kopieren wollen
- Wählen Sie im Ressourcen-Browser die Seite aus, die die Taste enthält, die Sie kopieren wollen




- Wählen Sie die gewünschte Taste aus.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Auswahl**.


Die neue Taste ist eine Kopie der ursprünglichen Taste. Ändern Sie das Original, ändert sich die Kopie nicht automatisch mit.

NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der Taste.
- Wählen Sie **Taste aus Bibliothek laden**

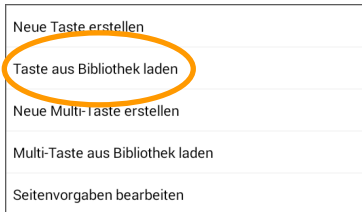

- Der Ressourcen-Browser öffnet sich.
- Wählen Sie im Ressourcen-Browser die Seite aus, die die Taste enthält, die Sie kopieren wollen:

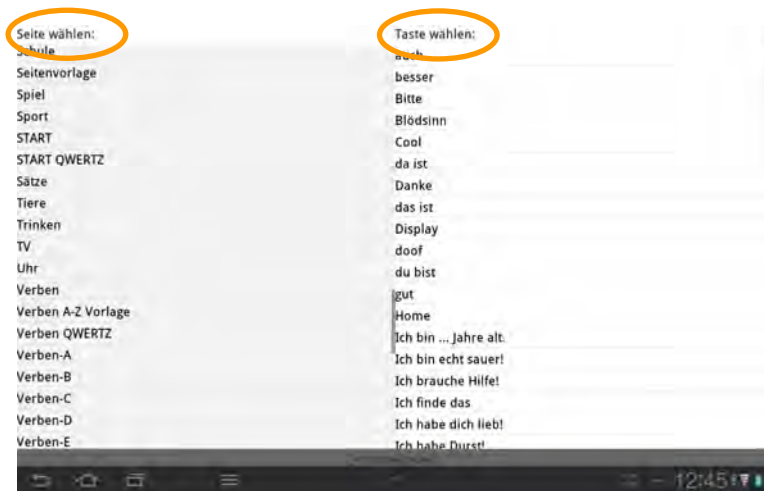

- Wählen Sie die gewünschte Taste durch Tippen aus.


Die neue Taste ist eine Kopie der ursprünglichen Taste. Ändern Sie das Original, ändert sich die Kopie nicht automatisch mit.

Taste kopieren


Sie können jede Taste kopieren und an einer anderen Stelle einfügen.

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, die Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Taste kopieren**.

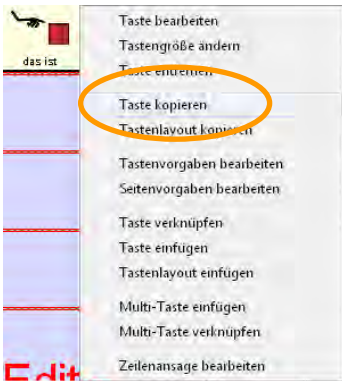

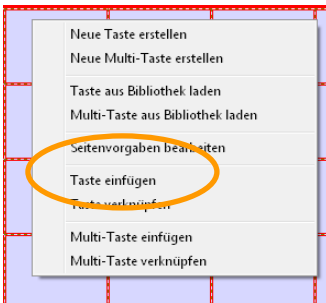

- Öffnen Sie die Seite, auf der die Taste eingefügt werden soll.
- Rechtsklicken Sie auf das Tastenfeld, auf dem die Taste eingefügt werden soll.
- Wählen Sie **Taste einfügen**.



Die neue Taste ist eine Kopie der ursprünglichen Taste. Ändern Sie das Original, ändert sich die Kopie nicht automatisch mit.

NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der Taste, die Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Taste kopieren**.

Taste bearbeiten
Tastengröße ändern
Taste entfernen
Taste kopieren
Tastenvorgaben bearbeiten
Seitenvorgaben bearbeiten

- Öffnen Sie die Seite, auf der die Taste eingefügt werden soll.
- Tippen und halten Sie auf dem Tastenfeld, auf dem die Taste eingefügt werden soll.
- Wählen Sie **Taste einfügen**.

Neue Taste erstellen
Taste aus Bibliothek laden
Neue Multi-Taste erstellen
Multi-Taste aus Bibliothek laden
Seitenvorgaben bearbeiten
Taste einfügen
Taste verknüpfen

Die neue Taste ist eine Kopie der ursprünglichen Taste. Ändern Sie das Original, ändert sich die Kopie nicht automatisch mit.

Taste verknüpfen


Während über „Taste einfügen“ eine Kopie einer Taste erzeugt wird, ermöglicht die Funktion „Taste verknüpfen“ das mehrfache Nutzen derselben Taste. Ändern Sie die Taste, ändern sich alle „Klone“ entsprechend. Dies ist z. B. sinnvoll, wenn Sie eine Taste mehrfach verwenden und möchten, dass diese Taste stets gleich aussieht.

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, die Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Taste kopieren**.



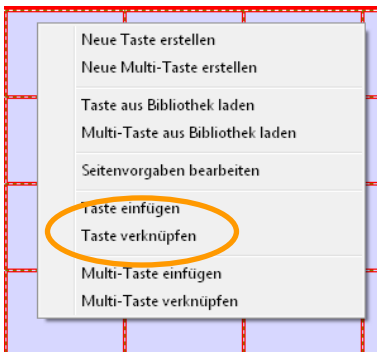

- Öffnen Sie die Seite, auf der die Taste eingefügt werden soll.
- Rechtsklicken Sie auf das Tastenfeld, auf dem die Taste eingefügt werden soll.
- Wählen Sie **Taste verknüpfen**.



Die neue Taste ist direkt mit der ursprünglichen verknüpft. Ändern Sie die Taste, ändern sich alle Klone automatisch mit.

NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der Taste, die Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Taste kopieren**.

Taste bearbeiten
Tastengröße ändern
Taste entfernen
Taste kopieren
Tastenvorgaben bearbeiten
Seitenvorgaben bearbeiten

- Öffnen Sie die Seite, auf der die Taste eingefügt werden soll.
- Tippen und halten Sie auf dem Tastenfeld, auf dem die Taste eingefügt werden soll.
- Wählen Sie **Taste verknüpfen**.

Neue Taste erstellen
Taste aus Bibliothek laden
Neue Multi-Taste erstellen
Multi-Taste aus Bibliothek laden
Seitenvorgaben bearbeiten
Taste einfügen
Taste verknüpfen

Die neue Taste ist direkt mit der ursprünglichen verknüpft. Ändern Sie die Taste, ändern sich alle Klone automatisch mit.

Tastenlayout übertragen


Sie können das Erscheinungsbild (Hintergrundfarbe, Labelschriftart, -größe, -farbe, Rahmenfarbe und -stärke) einer Taste ganz einfach auf eine andere übertragen. Der Inhalt der Taste (Mitteilung, Label, Bild, Funktion) wird dabei nicht berücksichtigt.

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, deren Layout Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Tastenlayout kopieren**.



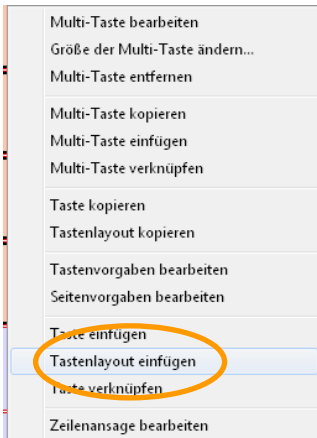

- Rechtsklicken Sie auf das Tastenfeld, das das Tastenlayout erhalten soll.
- Wählen Sie **Tastenlayout einfügen**.




- Das Layout wird übertragen.


Das Tastenlayout bleibt gespeichert und kann daher auf weitere Tasten übertragen werden, ohne dass Sie es erneut kopieren müssen.

NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der Taste, deren Layout Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Taste kopieren**.

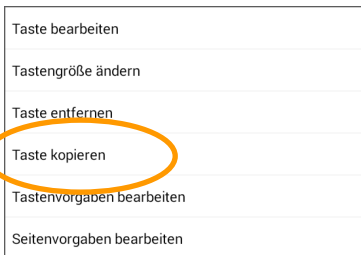

- Tippen und halten Sie auf dem Tastenfeld, das das Tastenlayout erhalten soll.
- Wählen Sie **Tastenlayout einfügen**.

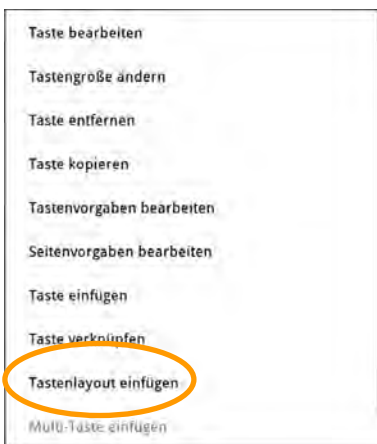

- Das Layout wird übertragen.

Das Tastenlayout bleibt gespeichert und kann daher auf weitere Tasten übertragen werden, ohne dass Sie es erneut kopieren müssen.

Tastengröße ändern



Sie können die Größe von Tasten ändern. Eine Taste kann sich über mehrere Zeilen und Spalten erstrecken. Darunter liegende Tasten werden ausgeblendet und sind nicht erreichbar, bleiben aber mit ihren Definitionen erhalten. Tasten werden grundsätzlich nach rechts und nach unten vergrößert, d. h. Tasten in der ganz rechten Spalte können nicht in der Breite und Tasten in der untersten Zeile nicht in der Höhe verändert werden.

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, deren Größe Sie ändern wollen.
- Wählen Sie **Tastengröße ändern**.



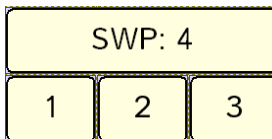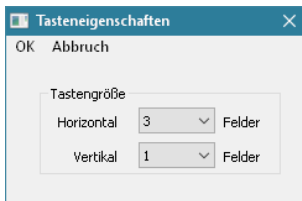

- Geben Sie ein, über wie viele Spalten (Wert: **Horizontal**) und Zeilen (Wert: **Vertikal**) sich die Taste erstrecken soll.




- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.


Wenn Sie die Größe der Taste wieder auf die ursprüngliche Größe reduzieren (1 Feld breit und 1 Feld hoch), werden die darunter liegenden Felder wieder sicht- und benutzbar.

NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der Taste, deren Größe Sie ändern wollen.
- Wählen Sie **Tastengröße ändern**.

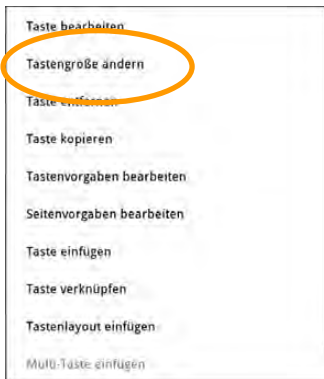

- Geben Sie ein, über wie viele Spalten (Wert: **Vertikale Zellen**) und Zeilen (Wert: **Horizontale Zellen**) und sich die Taste erstrecken soll:

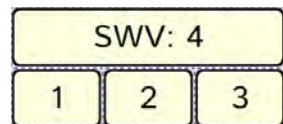A screenshot of a configuration dialog box. It has two input fields: 'Vertikale Zellen' with the value '1' and 'Horizontale Zellen' with the value '3'. At the bottom, there are 'OK' and 'Abbruch' buttons.

- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.


Wenn Sie die Größe der Taste wieder auf die ursprüngliche Größe reduzieren (1 Feld breit und 1 Feld hoch), werden die darunter liegenden Felder wieder sicht- und benutzbar.

Taste entfernen

Die Funktion **Taste entfernen** entfernt die ausgewählte Taste von der aktuellen Seite. Die Taste bleibt jedoch in der Bibliothek erhalten.



Chat-Editor

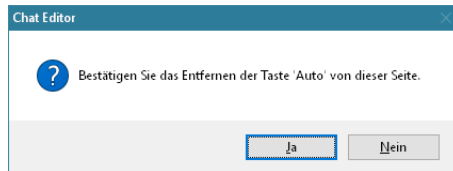
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, die Sie entfernen möchten.
- Wählen Sie **Taste entfernen**.



- Bestätigen Sie den Vorgang.

NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der Taste, die Sie löschen möchten. Das Kontextmenü öffnet sich.
- Wählen Sie **Taste entfernen**.

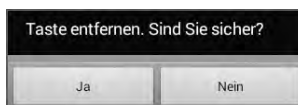

- Bestätigen Sie den Vorgang.

Multi-Taste

Eine Multi-Tasten ist eine Taste mit bis zu 50 Belegungen. Die jeweils aktive Belegung hängt davon ab, welcher Modifizierer gesetzt ist.

Es gibt folgende 50 Modifizierer:

- | | | | |
|-------------|---------|---------|-------------|
| · kein | · Fn 9 | · Fn 22 | · Fn 35 |
| · Groß | · Fn 10 | · Fn 23 | · Fn Fest A |
| · Strg | · Fn 11 | · Fn 24 | · Fn Fest B |
| · Groß fest | · Fn 12 | · Fn 25 | · Fn Fest C |
| · Num fest | · Fn 13 | · Fn 26 | · Fn Fest D |
| · Fn 1 | · Fn 14 | · Fn 27 | · Fn Fest E |
| · Fn 2 | · Fn 15 | · Fn 28 | · Fn Fest F |
| · Fn 3 | · Fn 16 | · Fn 29 | · Fn Fest G |
| · Fn 4 | · Fn 17 | · Fn 30 | · Fn Fest H |
| · Fn 5 | · Fn 18 | · Fn 31 | · Fn Fest I |
| · Fn 6 | · Fn 19 | · Fn 32 | · Fn Fest J |
| · Fn 7 | · Fn 20 | · Fn 33 | |
| · Fn 8 | · Fn 21 | · Fn 34 | |

Die Modifizierer *Groß*, *Strg*, *Groß fest* und *Num fest* sind für das Gestalten von Schriftseiten vorgesehen.

Die Modifizierer *Groß fest* und *Num fest* sowie *Fn Fest A* bis *Fn Fest J* bleiben stehen und müssen manuell zurückgesetzt werden. Alle anderen Modifizierer werden automatisch mit der Auswahl der nächsten Taste zurückgesetzt.

Multi-Tasten können neu oder von einer Vorlage erstellt oder kopiert werden.

Hinweis: in Vokabularen wie *LoGoFoXX* werden Modifizierer zum Bilden der Grammatik verwendet. Beachten Sie das Handbuch des Vokabulars, um festzustellen, welcher Modifizierer welche Funktion hat.

Multi-Taste benutzen

- Ist kein Modifizierer gesetzt, zeigt eine Multi-Taste die Grundbelegung (die für „kein Modifizierer“ definierte Belegung) an.
- Speichern Sie auf einer Taste den Befehl **Modifizierer anwenden** mit dem gewünschten Modifizierer, um die entsprechende Belegung einer Multi-Tasten sichtbar zu machen.
- Setzen Sie den Modifizierer, indem Sie die Taste auswählen, die den Befehl **Modifizierer anwenden** enthält.
- Die Seite zeigt die zugehörige Belegung der Multi-Taste(n) an. Hat eine Multi-Taste für den gewählten Modifizierer keine Belegung, bleibt das Tastenfeld leer.
- Wählen Sie eine Taste. Der Modifizierer wird zurückgesetzt, die Seite zeigt wieder die Grundbelegungen aller Multi-Tasten an.

Die Modifizierer *Groß fest* und *Num fest* sowie *Fn Fest A* bis *Fn Fest J* setzen sich nicht automatisch mit der Auswahl der nächsten Taste wieder zurück, sondern müssen manuell zurückgesetzt werden.


Multi-Taste benutzen

- Ist kein Modifizierer gesetzt, zeigt eine Multi-Taste die Grundbelegung (die für „kein Modifizierer“ definierte Belegung) an.
- Speichern Sie auf einer Taste den Befehl **Modifizierer anwenden** mit dem gewünschten Modifizierer, um die entsprechende Belegung einer Multi-Tasten sichtbar zu machen.
- Setzen Sie den Modifizierer, indem Sie die Taste auswählen, die den Befehl **Modifizierer anwenden** enthält.
- Die Seite zeigt die zugehörige Belegung der Multi-Taste(n) an. Hat eine Multi-Taste für den gewählten Modifizierer keine Belegung, bleibt das Tastenfeld leer.
- Wählen Sie eine Taste. Der Modifizierer wird zurückgesetzt, die Seite zeigt wieder die Grundbelegungen aller Multi-Tasten an.
- Die Modifizierer *Groß fest* und *Num fest* sowie *Fn Fest A* bis *Fn Fest J* setzen sich nicht automatisch mit der Auswahl der nächsten Taste wieder zurück, sondern müssen manuell („Alle Modifizierer löschen“) zurückgesetzt werden.

Multi-Taste erstellen

Chat-Editor

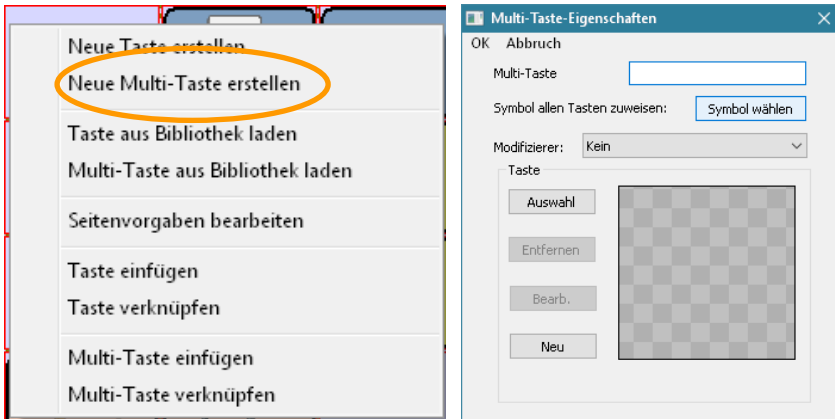

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf dem Tastenfeld.
- Wählen Sie **Neue Multi-Taste erstellen**.




- Geben Sie der Multi-Taste einen Namen.
- Wählen Sie den Modifizierer.
- Gestalten Sie die Multi-Taste für den gewählten Modifizierer. Die Gestaltung der Belegungen erfolgt analog zur Gestaltung einer normalen Taste.
- Fahren Sie mit der Gestaltung der Multi-Taste fort, bis Sie alle gewünschten Modifizierer belegt haben.

Mit der Funktion **Symbol allen Tasten zuweisen** können Sie allen belegten Ebenen einer Multi-Taste das gleiche Bild zuweisen.

NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der zu belegenden Taste, bis sich das Kontextmenü öffnet.
- Wählen Sie **Neue Multi-Taste erstellen**.

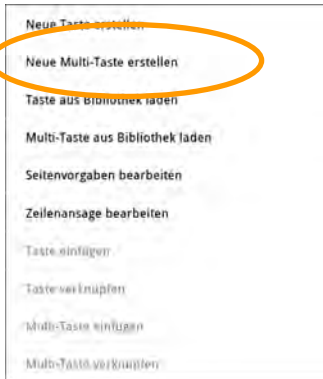

Name der Multi-Taste

Modifizierer

Kein

Taste

-nicht gesetzt-

Auswahl

Entfernen

Bearbeiten

Neu

OK Abbruch

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Del

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l

z x c v b n m , . ?

Ctrl # @ 0 English (UK)


- Geben Sie der Multi-Taste einen Namen.
- Wählen Sie den Modifizierer.
- Gestalten Sie die Multi-Taste für den gewählten Modifizierer. Die Gestaltung der Belegungen erfolgt analog zur Gestaltung einer normalen Taste.
- Fahren Sie mit der Gestaltung der Multi-Taste fort, bis Sie alle gewünschten Modifizierer belegt haben.

Multi-Taste aus Bibliothek laden

Jede einmal definierte Multi-Taste steht als ladbare Ressource in der Bibliothek zur Verfügung.

Chat-Editor

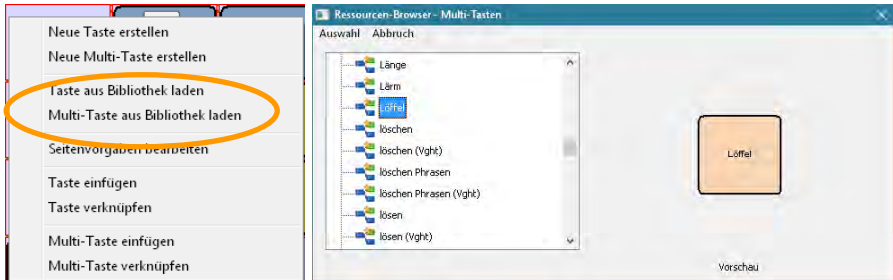

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste.
- Wählen Sie **Multi-Taste aus Bibliothek laden**.




- Wählen Sie das Vokabular, das die zu ladenden Multi-Taste enthält
- Wählen Sie die Multi-Taste.
- Weisen Sie der Multi-Taste ein Bild zu.

Mit der Funktion **Symbol allen Tasten zuweisen** können Sie allen belegten Ebenen einer Multi-Taste das gleiche Bild zuweisen. Diese Funktion steht nur im Chat-Editor zur Verfügung.

NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der zu belegenden Taste, bis sich das Kontextmenü öffnet.
- Wählen Sie **Multi-Taste aus Bibliothek laden**.

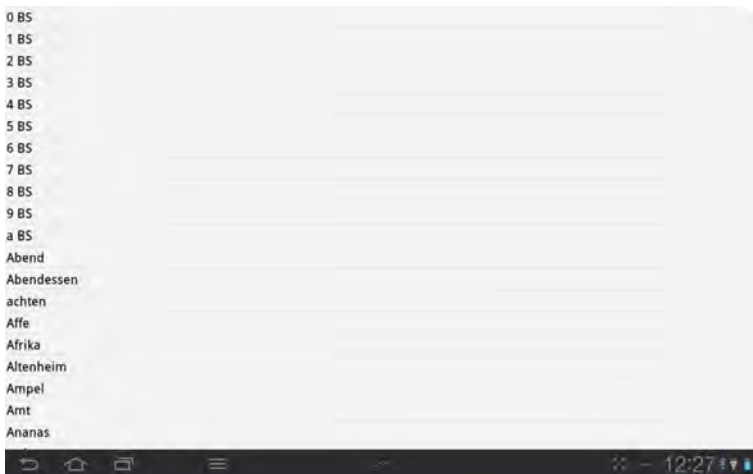

- Wählen Sie die Multi-Taste.
- Weisen Sie der Multi-Taste ein Bild zu.

Multi-Taste kopieren


Sie können eine einmal erstellte Multi-Taste kopieren und an anderer Position einfügen.

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Multi-Taste, die Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Multi-Taste kopieren**.



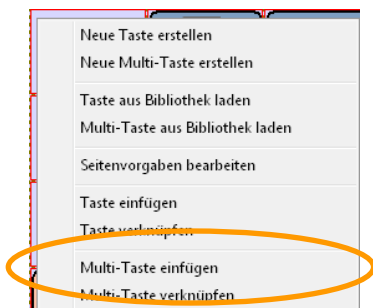


- Öffnen Sie die Seite, auf der die Multi-Taste eingefügt werden soll.
- Rechtsklicken Sie auf dem Tastenfeld, das die Multi-Taste enthalten soll.
- Wählen Sie **Multi-Taste einfügen**.




Die neue Multi-Taste ist eine Kopie der ursprünglichen Multi-Taste. Ändern Sie das Original, ändert sich die Kopie nicht automatisch mit.

NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der Multi-Taste, die Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Multi-Taste kopieren**.

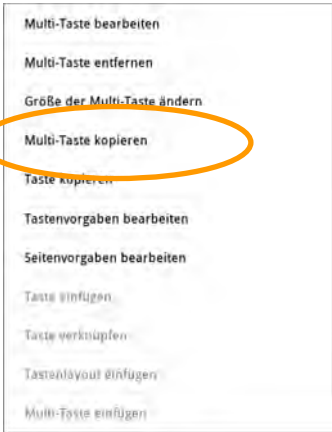

- Öffnen Sie die Seite, auf der die Multi-Taste eingefügt werden soll.
- Tippen und halten Sie auf dem Tastenfeld, das die Multi-Taste enthalten soll.
- Wählen Sie **Multi-Taste einfügen**.

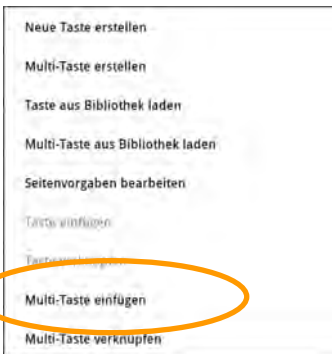


Die neue Multi-Taste ist eine Kopie der ursprünglichen Multi-Taste. Ändern Sie das Original, ändert sich die Kopie nicht automatisch mit.

Multi-Taste verknüpfen

Sie können eine einmal erstellte Multi-Taste mehrfach benutzen, indem Sie an anderer Position eine Verknüpfung einfügen. Ändern Sie das Original, ändert sich auch die Verknüpfung.


Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Multi-Taste, die Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Multi-Taste kopieren**.

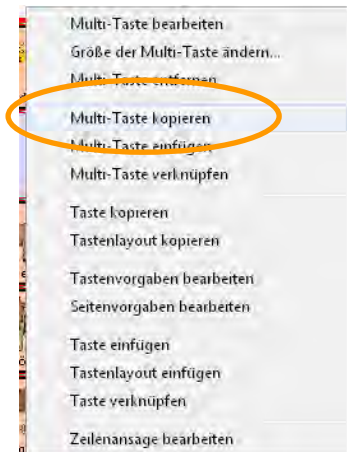



Öffnen Sie die Seite, auf der die Multi-Taste eingefügt werden soll.

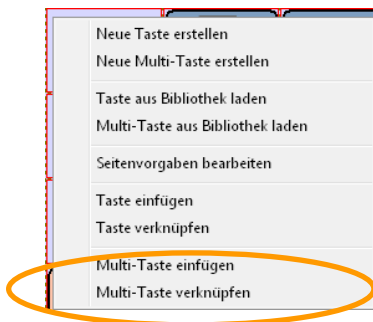
- Rechtsklicken Sie auf dem Tastenfeld, das die Multi-Taste enthalten soll.
- Wählen Sie **Multi-Taste verknüpfen**.




Die neue Multi-Taste ist direkt mit der ursprünglichen verknüpft. Ändern Sie das Original, ändern sich alle Klone automatisch mit.

NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der Multi-Taste, die Sie kopieren wollen.
- Wählen Sie **Multi-Taste kopieren**.

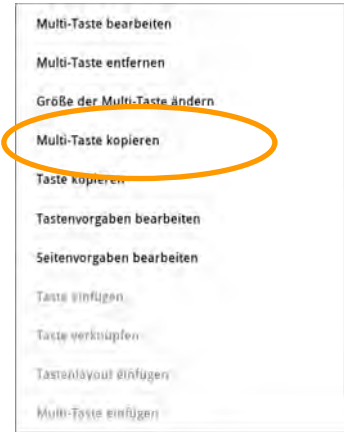

- Öffnen Sie die Seite, auf der die Multi-Taste eingefügt werden soll.
- Tippen und halten Sie auf dem Tastenfeld, das die Multi-Taste enthalten soll.
- Wählen Sie **Multi-Taste verknüpfen**.

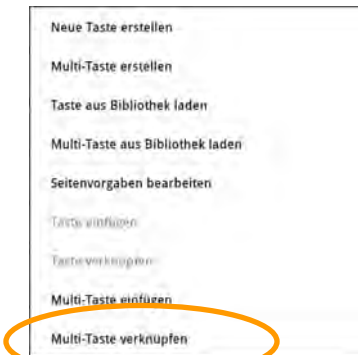


Die neue Multi-Taste ist direkt mit der ursprünglichen verknüpft. Ändern Sie das Original, ändern sich alle Klone automatisch mit.

Multi-Taste bearbeiten



Chat-Editor

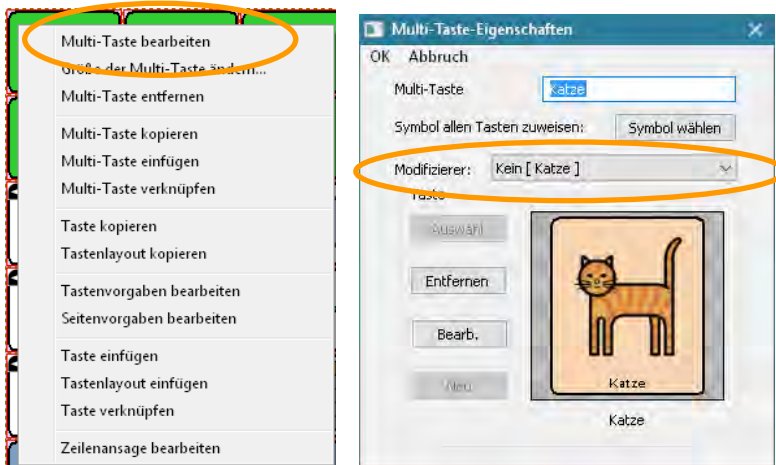
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Multi-Taste.
- Wählen Sie **Multi-Taste bearbeiten**. Die aktuelle Belegung der Multi-Taste wird angezeigt.



- Wählen Sie den Modifizierer, dessen Belegung Sie ändern möchten.
- Wählen Sie **Bearb.**
- Die Gestaltung der jeweiligen Belegung erfolgt analog zur Gestaltung von Tasten.
- Wählen Sie „OK“, wenn Sie die Änderungen abgeschlossen haben.


NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und halten Sie auf der Multi-Taste.
- Wählen Sie **Multi-Taste bearbeiten**. Die aktuelle Belegung der Multi-Taste wird angezeigt.

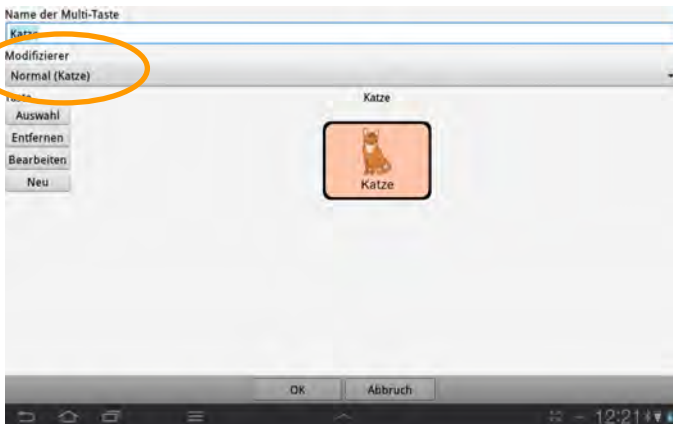

- Wählen Sie den Modifizierer, dessen Belegung Sie ändern möchten.
- Wählen Sie **Bearbeiten**.
- Die Gestaltung der jeweiligen Belegung erfolgt analog zur Gestaltung von Tasten.
- Wählen Sie **OK**, wenn Sie die Änderungen abgeschlossen haben.

Tip: Zum Ausblenden der Bildschirmtastatur tippen Sie auf das Pfeil-Symbol: 

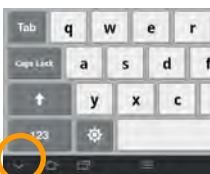


Sound wiedergeben

Sie können auch digitalisierte Sprache für Mitteilungen verwenden. Neben Aussagen in einer Fremdsprache können Sie so auch Geräusche, Klänge und Musik wiedergeben.

Chat-Editor


- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, die einen Sound wiedergeben soll.
- Wählen Sie **Neue Taste erstellen** oder **Taste bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Funktion**.
- Entfernen Sie die Funktion **Mitteilung ausgeben**.
- Wählen Sie die Funktion **Sound wiedergeben**.
- Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Das Fenster “Sound-Eigenschaften” erscheint.

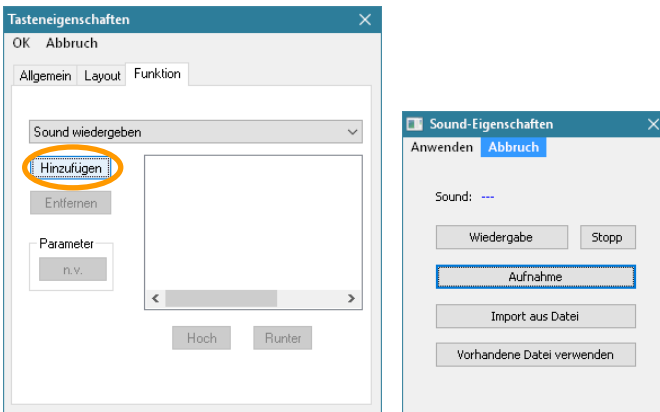

- Wählen Sie die wiederzugebende Sounddatei aus:
 - **Aufnahme**: Machen Sie eine Aufnahme mit dem Chat-Editor. An Ihren PC muss ein Mikrofon angeschlossen sein (siehe nächste Seite für das Durchführen einer Aufnahme).
 - **Import aus Datei**: Importieren Sie eine wav- oder mp3-Datei. Wählen Sie die Datei aus. Die Datei darf max. 1 MB groß sein.
 - **Vorhandene Datei verwenden**: verwenden Sie einen bereits im NovaChat vorhandenen Sound. Wählen Sie das Vokabular, das den Sound enthält, und anschließend den Sound.



Aufnahme machen

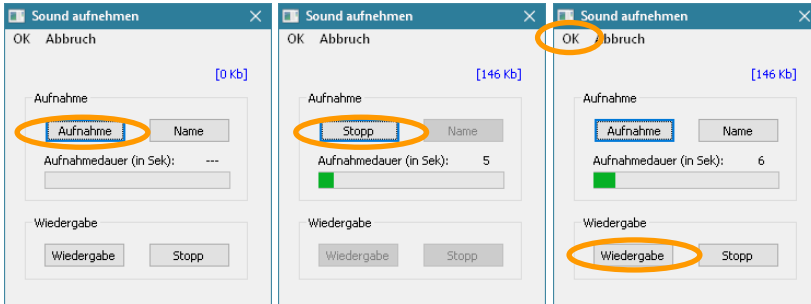
Wählen Sie **Aufnahme** im Fenster „Sound-Eigenschaften“. Das Fenster „Sound aufnehmen“ wird angezeigt.



- Klicken Sie auf **Aufnahme**. Die Aufnahme beginnt zu laufen. Sprechen Sie in das Mikrofon.
- Klicken Sie auf **Stopp**, sobald die Mitteilung beendet haben.
- Klicken Sie auf **Wiedergabe**, um die Aufnahme zu kontrollieren.
- Wiederholen Sie die Aufnahme, wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind
- Klicken Sie auf **Name**, um der Aufnahme einen Namen zu geben.
- Klicken Sie auf **OK**, um die Aufnahme zu beenden. Der Sound steht ab jetzt mit dem von Ihnen eingegebenem Namen in der Bibliothek zur Verfügung.


NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und Halten Sie auf der Taste, die einen Sound wiedergeben soll.
- Wählen Sie **Neue Taste erstellen** oder **Taste bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Funktion**.
- Löschen Sie die Funktion **Mitteilung ausgeben**.
- Wählen Sie die Funktion **Sound wiedergeben**.

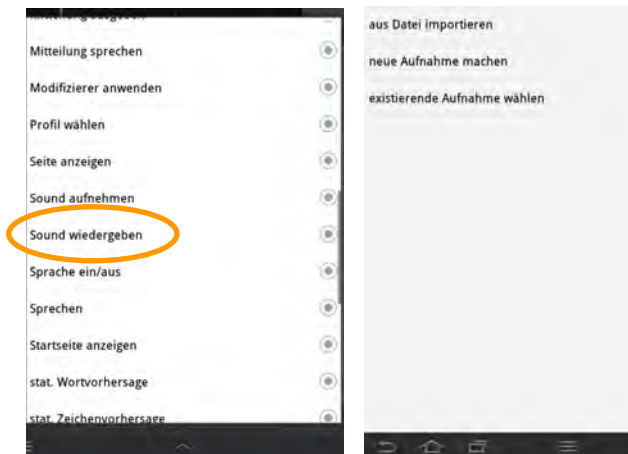


- Wählen Sie die wiederzugebende Sounddatei aus:
 - **Aus Datei importieren:** Importieren Sie eine wav- oder mp3-Datei. Die Datei muss sich auf dem Tablet befinden. Wählen Sie die Datei aus.
 - **Neue Aufnahme machen:** Machen Sie eine Aufnahme direkt mit dem NovaChat-Gerät (siehe nächste Seite für das Durchführen einer Aufnahme).
 - **Existierende Aufnahme wählen:** Verwenden Sie einen bereits im NovaChat vorhandenen Sound. Wählen Sie das Vokabular, das den Sound enthält, und anschließend den Sound.

Aufnahme machen

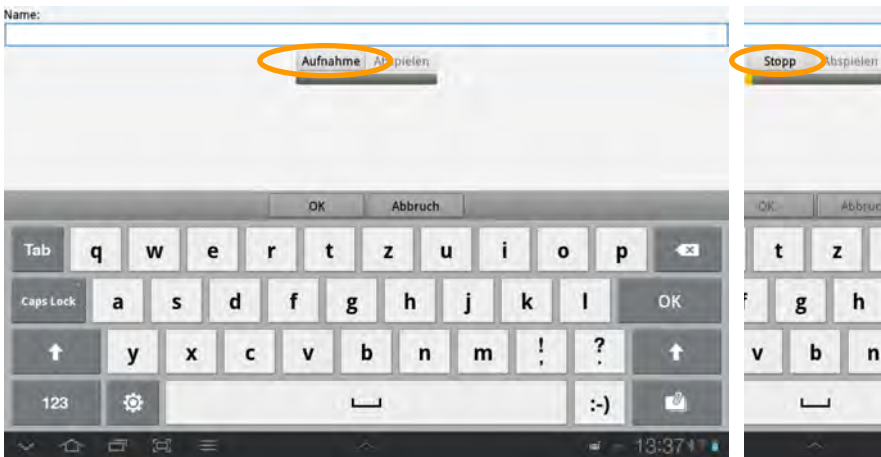

- Tippen Sie auf **Aufnahme**. Die Aufnahme beginnt zu laufen. Sprechen Sie in das Mikrofon.
- Tippen Sie auf **Stopp**, sobald die Sie Mitteilung beendet haben.
- Tippen Sie auf **Abspielen**, um die Aufnahme zu kontrollieren.
- Wiederholen Sie die Aufnahme, wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind.
- Tippen Sie auf das Textfeld unterhalb von **Name**, um der Aufnahme einen Namen zu geben.
- Klicken Sie auf **OK**, um die Aufnahme zu beenden. Der Sound steht ab jetzt mit dem von Ihnen eingegebenen Namen in der Bibliothek zur Verfügung.

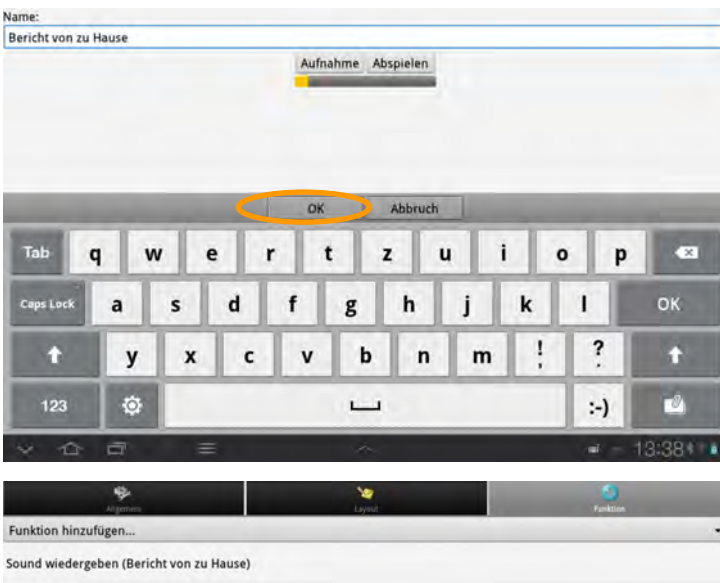


Sound aufnehmen

Sie können Tasten zum Aufnehmen einer digitalisierten Mitteilung gestalten.


Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf der Taste, die den Sound aufnehmen soll.
- Wählen Sie **Neue Taste erstellen** oder **Taste bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Funktion**.
- Löschen Sie die Funktion **Mitteilung ausgeben**.
- Wählen Sie die Funktion **Sound aufnehmen**.
- Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Der Sound hat noch keinen Namen.

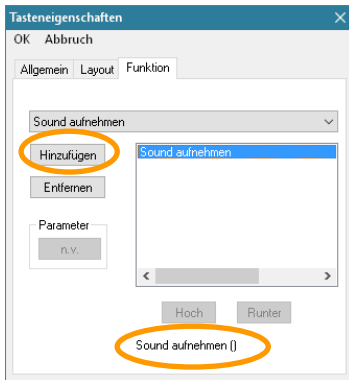


Sound zuweisen

Aktivieren Sie die mit der Funktion **Sound aufnehmen** belegte Taste. Das Fenster „Sound aufnehmen“ wird angezeigt.

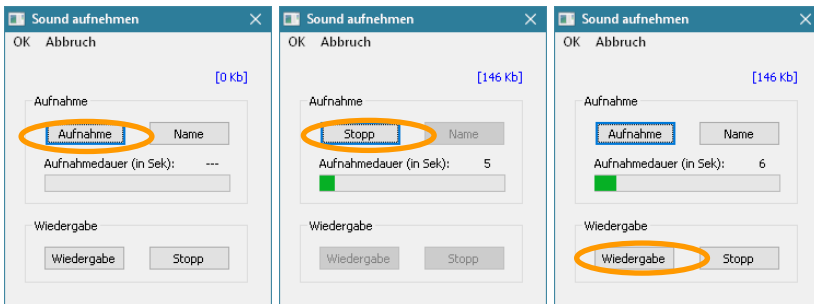



- Klicken Sie auf **Aufnahme**. Die Aufnahme beginnt zu laufen. Sprechen Sie in das Mikrofon.
- Klicken Sie auf **Stopp**, sobald die Sie Mitteilung beendet haben
- Klicken Sie auf **Wiedergabe**, um die Aufnahme zu kontrollieren.
- Wiederholen Sie die Aufnahme, wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind.
- Klicken Sie auf **Name**, um der Aufnahme einen Namen zu geben.

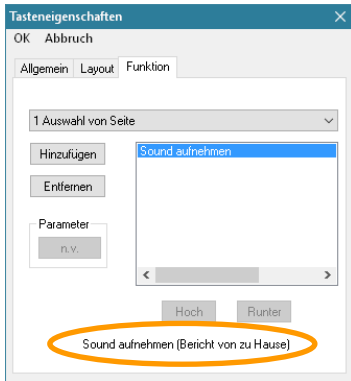
- Klicken Sie auf **OK**, um die Aufnahme zu beenden. Der Sound steht ab jetzt mit dem von Ihnen eingegebenen Namen in der Bibliothek zur Verfügung.



Jedes Mal, wenn Sie die Taste aktivieren und eine neue Aufnahme anfertigen, überschreiben Sie die unter diesem Namen existierende Aufnahme.


NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und Halten Sie auf der Taste, die einen Sound aufnehmen soll.
- Wählen Sie **Neue Taste erstellen** oder **Taste bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Funktion**.
- Löschen Sie die Funktion **Mitteilung ausgeben**.
- Wählen Sie die Funktion **Sound aufnehmen**.

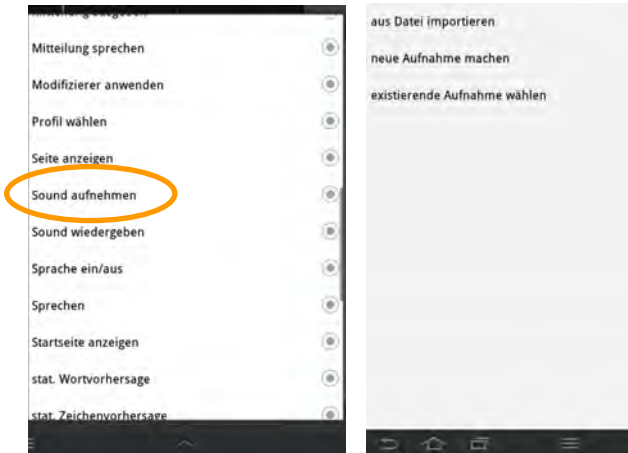


- Wählen Sie die aufzunehmende Sounddatei aus:
 - **Aus Datei importieren:** die Aufnahme überschreibt eine vorhandene wav- oder mp3-Datei. Die Datei muss sich auf dem Tablet befinden. Wählen Sie die Datei aus.
 - **Neue Aufnahme machen:** Machen Sie eine Aufnahme direkt mit dem NovaChat-Gerät (siehe nächste Seite für das Durchführen einer Aufnahme).
 - **Existierende Aufnahme wählen:** Verwenden Sie einen bereits im NovaChat vorhandenen Sound. Wählen Sie den Sound aus.

Aufnahme machen

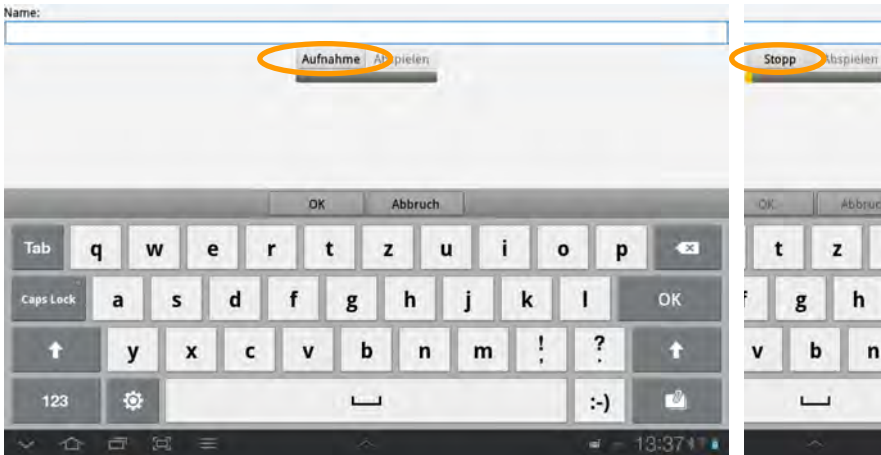

- Tippen Sie auf **Aufnahme**. Die Aufnahme beginnt zu laufen. Sprechen Sie in das Mikrofon.
- Tippen Sie auf **Stopp**, sobald die Sie Mitteilung beendet haben.
- Tippen Sie auf **Abspielen**, um die Aufnahme zu kontrollieren.
- Wiederholen Sie die Aufnahme, wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind.
- Tippen Sie auf das Textfeld unterhalb von **Name**, um der Aufnahme einen Namen zu geben.
- Klicken Sie auf **OK**, um die Aufnahme zu beenden. Der Sound steht ab jetzt mit dem von Ihnen eingegebenen Namen in der Bibliothek zur Verfügung.

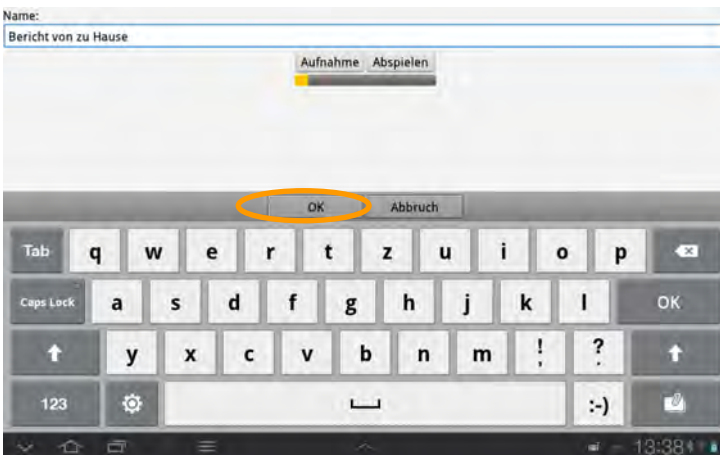

Jedes Mal, wenn Sie die Taste aktivieren und eine neue Aufnahme anfertigen, überschreiben Sie die unter diesem Namen existierende Aufnahme.

Audio- und Videodateien wiedergeben

Sie können auf dem NovaChat- vorhandene Audio- und Videodateien Tasten zuweisen. Durch Auswahl der Taste wird die entsprechende Datei wiedergegeben.

Videos werden im Bereich unterhalb des Textfensters wiedergegeben, anschließend kehrt der NovaChat zur aktuellen Seite des Vokabulars zurück. Wollen Sie die Wiedergabe des Videos abbrechen, so betätigen Sie die Taste „zurück“ des Tablets.

Audiodatei einer Taste zuweisen

- Erzeugen Sie eine neue Taste oder bearbeiten Sie eine existierende Taste.
- Weisen Sie der Taste die Funktion „Audiobibliothek wiedergeben zu.
- Wählen Sie die gewünschte Audiodatei aus. Alle auf dem NovaChat-Gerät vorhandenen Audiodateien werden angezeigt.
- Sofern die Audiodatei länger ist, stellen Sie sicher, dass Sie eine mit der Funktion „Wiedergabe der Audio-Bibliothek beenden“ belegte Taste haben, um die Wiedergabe der Audiodatei ggf. abbrechen zu können.

Wiedergabe einer Audiodatei beenden

- Erzeugen Sie eine neue Taste oder bearbeiten Sie eine existierende Taste.
- Weisen Sie der Taste die Funktion“ Wiedergabe der Audio-Bibliothek beenden“ zu.
- Betätigen Sie die Taste, um die Wiedergabe einer Audiodatei abzubrechen.

Videodatei einer Taste zuweisen

- Erzeugen Sie eine neue Taste oder bearbeiten Sie eine existierende Taste.
- Weisen Sie der Taste die Funktion „Videodatei abspielen“ zu.
- Wählen Sie die gewünschte Videodatei aus. Alle auf dem NovaChat-Gerät vorhandenen Videodateien werden angezeigt.

Tipp: Speichern Sie die gewünschten Dateien auf einer Micro-SD-Speicherkarte, so wird der interne Speicher des Geräts nicht belastet. Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC auf das NovaChat-Gerät.

Wortsuche


Mit Hilfe der Wortsuche kann ein im Vokabular gespeichertes Wort gefunden werden. Die Funktion steht nur auf dem NovaChat-Gerät zur Verfügung.

Es gibt 2 Möglichkeiten der Wortsuche:



- als einfügbare Tastenfunktion
- als Menü in der Menüleiste


Wortsuche als Tastenfunktion

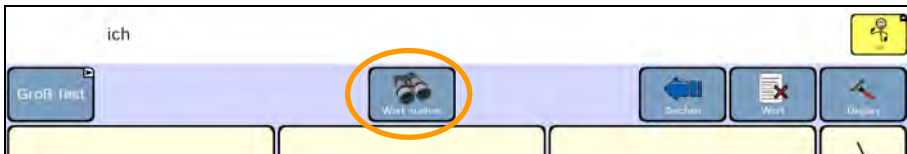- Belegen Sie eine Taste Ihres Vokabulars mit der Funktion „Wortsuche“ (siehe Seite 98 zum Belegen einer Taste mit einer Funktion).
- Geben Sie das Wort über die Schriftseite ein.
- Betätigen Sie die mit „Wortsuche“ belegte Taste.
- NovaChat zeigt Ihnen alle Vorkommnisse des Words im Vokabular an.




Wortsuche mittels Menü

- Stellen Sie sicher, dass das Menü „Wortsuche“ im Hauptmenü angezeigt wird (siehe S. 208).
- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.

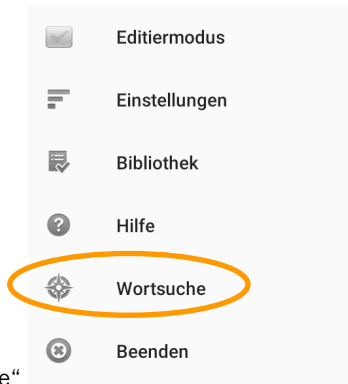

- Wählen Sie „Wortsuche“
- Geben Sie das gesuchte Wort über die Bildschirmtastatur ein.
- Die Suche beginnt automatisch, sobald Sie tippen.
- NovaChat zeigt Ihnen alle Vorkommnisse des Words im Vokabular an.

essen

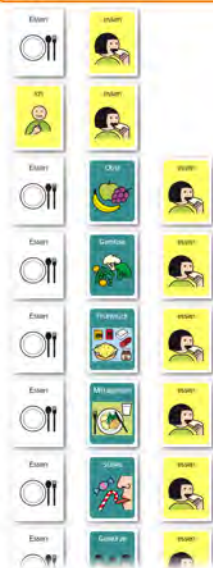



Hinweis: Die Wortsuche funktioniert nicht mit auf Multitasten gespeicherten Mitteilungen!


Android-Anwendung öffnen


Die Funktion steht nur auf dem NovaChat-Gerät zur Verfügung.

Diese Funktion kann nicht ausgeführt werden, wenn das NovaChat-Gerät als geschlossene Anlage konfiguriert oder der Kiosk-Modus aktiviert ist.

NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und Halten Sie auf der Taste, die eine Android-Anwendung öffnen soll.
- Wählen Sie **Neue Taste erstellen** oder **Taste bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Funktion**.
- Löschen Sie die Funktion **Mitteilung ausgeben**.
- Wählen Sie die Funktion **Android-Anwendung öffnen**.

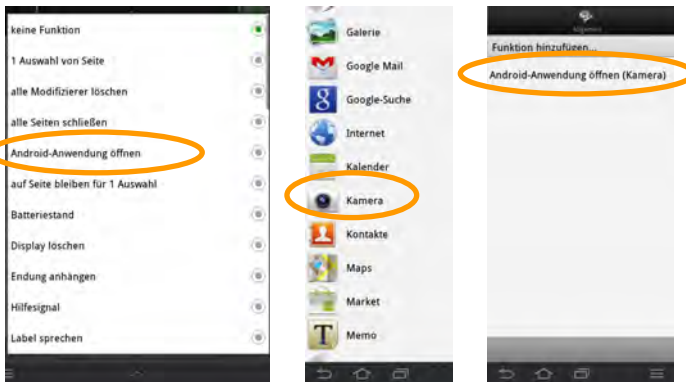

- Wählen Sie die Anwendung aus, z.B. „Kamera“.
- Gestalten Sie die Taste nach Ihren Wünschen .
- Aktivieren Sie die Taste. Die Kamera-App des Tablets wird gestartet:



- Machen Sie ein Foto.
- Beenden Sie die Kamera-App. Das System kehrt automatisch zur Chat-App zurück.
- Das Foto wird im Tablet gespeichert und kann z.B. als Symbol auf einer Taste verwendet werden.

Grammatikfunktionen

Die Chat-Software verfügt über Funktionen zum Deklinieren und Konjugieren von Adjektiven, Nomen, Pronomen und Verben in Verbindung mit der integrierten Grammatik-Datenbank.

Wörter, die nicht in der Grammatik-Datenbank enthalten sind, können mit den hier aufgeführten Funktionen nicht gebeugt werden.

Haben Sie ein Wortschatzprogramm von Prentke Romich erhalten, das grammatikalisch korrekte Sprache ermöglicht, sind die entsprechenden Belegungen und Programmierungen bereits enthalten.

Wort abwandeln

Diese Funktion dient dem nachträglichen Abwandeln (Beugen) von Adjektiven, Nomen, Pronomen und Verben.

Das Wort wird zuerst abgerufen bzw. geschrieben, die Beugungsregel wird auf das zuletzt im Textfenster abgebildete Wort angewandt. Das zu beugende Wort muss dort in der Grundform (Verb=Infinitiv, Adjektiv=Positiv, Nomen=Nominativ) stehen.

Durch das Anwenden der Beugungsregel wird das Wort im Textfenster entsprechend geändert und erneut gesprochen.

Beispiel: Sie rufen das Wort „Haus“ ab und drücken anschließend die mit der Funktion „Wort abwandeln (Nomen Plural)“ belegte Taste. Das Wort „Haus“ wird abgewandelt in das Wort „Häuser“.

Eine Übersicht über die zur Verfügung stehenden Beugungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 142.

Nächstes Wort abwandeln

Diese Funktion ermöglicht es, die Form eines flektierbaren Wortes dynamisch zu bilden und anzuzeigen, bevor es abgerufen wird. Die Beugungsregel wird auf das nächste abgerufene Wort angewandt.

Damit die Chat-Software weiß, ob eine Beugungsregel auf ein Wort anwendbar ist, müssen Tasten entsprechend ihrer Wortart markiert sein. Für Adjektive, Nomen und Verben erfolgt dies mit Hilfe der Funktion „Wortart zuweisen“.

Beispiel: Sie haben eine Seite mit Verben angelegt. Alle Tasten auf dieser Seite enthalten je ein Verb im Infinitiv und als erstes die Funktion „Wortart zuweisen (Verb)“. Drücken Sie vor Auswahl des Verbs eine mit der Funktion „Wort abwandeln (Partizip Perf.)“ belegte Taste. Alle Verben auf der Seite werden in die Form Partizip Perfekt gebracht (aus „essen“ wird „gegessen“, aus „sein“ wird „gewesen“, aus „gehen“ wird „gegangen“ etc.). Wählen Sie das Verb aus. Sie erhalten direkt die abgewandelte Form.

Um zusätzlich die gebeugte Form des Wortes als Label auf der Taste angezeigt zu bekommen, muss die Funktion „Dynamische Labels“ im Menü Einstellungen-Schreibhilfen“ aktiviert sein (siehe Seite 203).

Wortart zuweisen

Die Funktion „Wortart zuweisen“ muss als erste Funktion auf Tasten gespeichert werden, die vor dem Abrufen – d.h. mit der Funktion „Nächstes Wort abwandeln“ –

gebeugt werden sollen. Tasten können so als Adjektiv, Nomen oder Verb gekennzeichnet werden.

Für das nachträgliche Abwandeln von Wörtern mit der Funktion „Wort abwandeln“ wird die Funktion „Wortart zuweisen“ nicht benötigt.

Dynamische Labels

Ist diese Funktion aktiviert, wird nach der Funktion „Nächstes Wort abwandeln“ die gebeugte Wortform als Label auf der Taste angezeigt, sofern der Taste die korrekte Wortart zugewiesen wurde und die gebeugte Form existiert.

Dynamische Labels aktivieren

- Wählen Sie **Einstellungen – Schreibhilfen**.



- Setzen Sie den Haken bei **Dynamische Labels**.

Übersicht Beugungsmöglichkeiten

Für das Beugen von Wörtern mittels „Wort abwandeln“ und „Nächstes Wort abwandeln“ stehen folgende Beugungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Funktion	Beschreibung	Beispiel
Adj -e	Dekliniert ein Adjektiv in die weibliche Form	„schnell“ → „schnelle“
Adj -em	Dekliniert ein Adjektiv in die Dativform	„schnell“ → „schnellem“
Adj -en	Dekliniert ein Adjektiv in die Akkusativform	„schnell“ → „schnellen“
Adj -er	Dekliniert ein Adjektiv in die männliche Form	„schnell“ → „schneller“
Adj -es	Dekliniert ein Adjektiv in die sächliche Form	„schnell“ → „schnelles“
Adj. Komp -e	Dekliniert ein Adjektiv in die weibliche Komparativform	„schnell“ → „schnellere“
Adj. Komp -em	Dekliniert ein Adjektiv in die Form Komparativ Dativ	„schnell“ → „schnellerem“
Adj. Komp -en	Dekliniert ein Adjektiv in die Form Komparativ Akkusativ	„schnell“ → „schnelleren“
Adj. Komp -er	Dekliniert ein Adjektiv in die männliche Komparativform	„schnell“ → „schnellere“
Adj. Komp -es	Dekliniert ein Adjektiv in die sächliche Komparativform	„schnell“ → „schnelleres“
Adj. Superl -e	Dekliniert ein Adjektiv in die weibliche Superlativform	„schnell“ → „schnellste“
Adj. Superl -em	Dekliniert ein Adjektiv in die Form Superlativ Dativ	„schnell“ → „schnellstem“

Adj. Superl -en	Dekliniert ein Adjektiv in die Form Superlativ Akkusativ	„schnell“ → „schnellsten“
Adj. Superl -er	Dekliniert ein Adjektiv in die männliche Superlativform	„schnell“ → „schnellster“
Adj. Superl -es	Dekliniert ein Adjektiv in die sächliche Superlativform	„schnell“ → „schnellstes“
Adj. Superlativ	Dekliniert ein Adjektiv in die Superlativform	„schnell“ → „am schnellsten“
Grundform	Bildet die ungebeugte Grundform	„sein“ → „sein“
Hinzufügen -e	Hängt ein „e“ an ein Pronomen an	„jed“ → „jede“
Hinzufügen -em	Hängt ein „em“ an ein Pronomen an	„jed“ → „jedem“
Hinzufügen -en	Hängt ein „en“ an ein Pronomen an	„jed“ → „jeden“
Hinzufügen -er	Hängt ein „er“ an ein Pronomen an	„jed“ → „jeder“
Hinzufügen -es	Hängt ein „es“ an ein Pronomen an	„jed“ → „jedes“
Imperativ	Beugt ein Verb in die Form Imperativ Singular.	„sein“ → „sei“
Nomen Genitiv	Beugt ein Nomen in die Form Singular Genitiv	„Haus“ → „Hauses“
Nomen Pl. Dativ	Beugt ein Nomen in die Form Plural Dativ	„Haus“ → „Häusern“
Nomen Plural	Beugt ein Nomen in die Pluralform	„Haus“ → „Häuser“
Partizip Perfekt	Beugt ein Verb in die Form Partizip Perfekt	„sein“ → „gewesen“
Partizip Präs.	Beugt ein Verb in die Form Partizip Präsens	„sein“ → „seiend“
Verb 1./3.Pers. Pl.	Beugt ein Verb in die 1. bzw. 3. Person Plural	„sein“ → „sind“
Verb 1./3.Pers. Pl. (Vght)	Beugt ein Verb in die 1. bzw. 3. Person Plural Vergangenheit	„sein“ → „waren“
Verb 1./3.Pers. Pl. Konj. II	Beugt ein Verb in die 1. bzw. 3. Person Plural Konjunktiv II	„sein“ → „wären“
Verb 1.Person Sing.	Beugt ein Verb in die 1. Person Singular	„sein“ → „bin“
Verb 1.Person Sing (Vght)	Beugt ein Verb in die 1. Person Singular Vergangenheit	„sein“ → „war“
Verb 1.Person Sing Konj. II	Beugt ein Verb in die 1. Person Singular Konjunktiv II	„sein“ → „wäre“
Verb 2.Pers. Pl.	Beugt ein Verb in die 2. Person Plural	„sein“ → „seid“
Verb 2.Pers. Pl. (Vght)	Beugt ein Verb in die 2. Person Plural Vergangenheit	„sein“ → „wart“

Verb 2.Pers. Pl. Konj. II	Beugt ein Verb in die 2. Person Plural Konjunktiv II	„sein“ → „wärt“
Verb 2.Pers. Sing.	Beugt ein Verb in die 2. Person Singular	„sein“ → „bist“
Verb 2.Pers. Sing. (Vght)	Beugt ein Verb in die 2. Person Singular Vergangenheit	„sein“ → „warst“
Verb 2.Pers. Sing. Konj. II	Beugt ein Verb in die 2. Person Singular Konjunktiv II	„sein“ → „wärest“
Verb 3.Pers. Sing.	Beugt ein Verb in die 3. Person Singular	„sein“ → „ist“
Verb 3.Pers. Sing. (Vght)	Beugt ein Verb in die 3. Person Singular Vergangenheit	„sein“ → „war“
Verb 3.Pers. Sing. Konj. II	Beugt ein Verb in die 3. Person Singular Konjunktiv II	„sein“ → „wär“
Verbphr. du	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „du“	„sein“ → „du bist“
Verbphr. du (Vght)	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „du“ in der Vergangenheitsform	„sein“ → „du warst“
Verbphr. du Konj. II	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „du“ in der Form Konjunktiv II	„sein“ → „du wärest“
Verbphr. er	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „er“	„sein“ → „er ist“
Verbphr. er (Vght)	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „er“ in der Vergangenheitsform	„sein“ → „er war“
Verbphr. er Konj. II	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „er“ in der Form Konjunktiv II	„sein“ → „er wär“
Verbphr. es	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „es“	„sein“ → „es ist“
Verbphr. es (Vght)	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „es“ in der Vergangenheitsform	„sein“ → „es war“
Verbphr. es Konj. II	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „es“ in der Form Konjunktiv II	„sein“ → „es wär“
Verbphr. ich	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „ich“	„sein“ → „ich bin“
Verbphr. ich (Vght)	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „ich“ in der Vergangenheitsform	„sein“ → „ich war“
Verbphr. ich Konj. II	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „ich“ in der Form Konjunktiv II	„sein“ → „ich wär“
Verbphr. ihr	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „ihr“	„sein“ → „ihr seid“
Verbphr. ihr (Vhgt)	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „ihr“ in der Vergangenheitsform	„sein“ → „ihr wart“


Verbphr. ihr Konj. II	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „ihr“ in der Form Konjunktiv II	„sein“ → „ihr wärt“
Verbphr. sie	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „sie“	„sein“ → „sie ist“
Verbphr. sie (Vght)	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „sie“ in der Vergangenheitsform	„sein“ → „sie war“
Verbphr. sie Konj. II	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „sie“ in der Form Konjunktiv II	„sein“ → „sie wäre“
Verbphr. sie Pl.	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „sie (Pl.)“	„sein“ → „sie sind“
Verbphr. sie Pl. (Vght)	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „sie (Pl.)“ in der Vergangenheitsform	„sein“ → „sie waren“
Verbphr. sie Pl Konj. II	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „sie (Pl.)“ in der Form Konjunktiv II	„sein“ → „sie wären“
Verbphr. wir	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „wir“	„sein“ → „wir sind“
Verbphr. wir (Vght)	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „wir“ in der Vergangenheitsform	„sein“ → „wir waren“
Verbphr. wir Konj. II	Ändert ein Verb in eine Verbphrase mit „wir“ in der Form Konjunktiv II	„sein“ → „wir wären“

Tasten anzeigen/verbergen

Tasten, die Sie nicht benötigen, können Sie einfach verbergen. Sie stehen dem Benutzer dann nicht zur Verfügung, bleiben aber im Vokabular enthalten. Verborgene Tasten können jederzeit wieder sichtbar gemacht werden.

Chat-Editor


- Wählen Sie die Seite, auf der Tasten verborgen bzw. verborgene wieder angezeigt werden sollen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Wählen Sie **Tasten anzeigen/verbergen** in der Menüleiste:

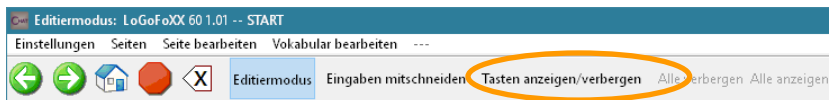


- Tippen Sie auf eine Taste, um sie zu verbergen. Die Taste wird ausgegraut.
- Tippen Sie auf eine verborgene Taste, um sie wieder anzuzeigen. Die Taste wird wieder normal angezeigt.



Klicken Sie auf **Alle verbergen**, um alle Tasten zu verbergen:

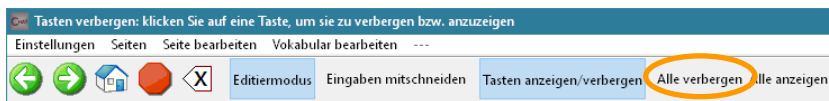


Klicken Sie auf **Alle anzeigen**, um alle Tasten wieder anzuzeigen:

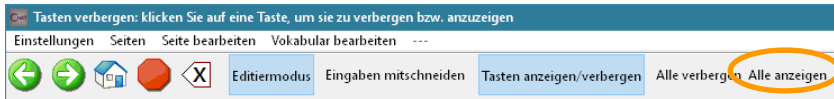




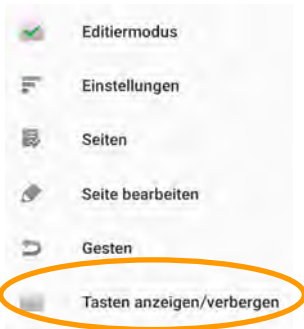
- Wählen Sie **Tasten anzeigen/verbergen** in der Menüleiste, um das Verbergen / Anzeigen von Tasten zu beenden.
- Beenden Sie den **Editiermodus**.

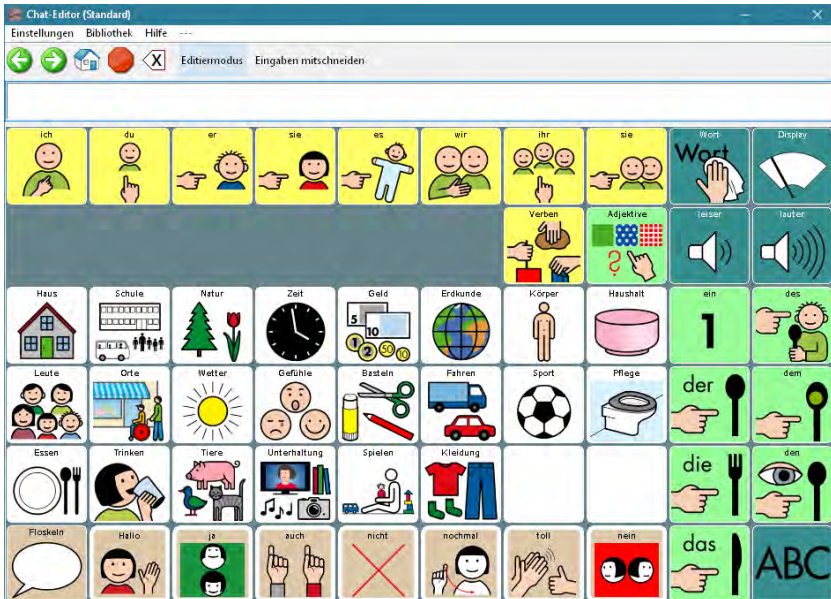Verborgene Tasten werden nicht mehr angezeigt:



NovaChat-Gerät


- Wählen Sie die Seite, auf der Tasten verborgen bzw. wieder angezeigt werden sollen.
- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ** .
- Wählen Sie **Tasten anzeigen/verbergen**:




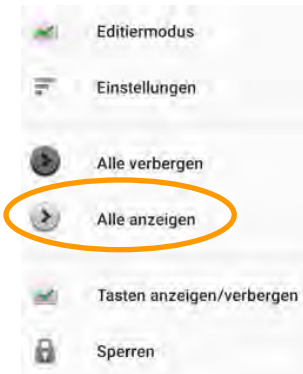
- Tippen Sie auf eine Taste, um sie zu verbergen. Die Taste wird ausgegraut.
- Tippen Sie auf eine verborgene Taste, um sie wieder anzuzeigen. Die Taste wird wieder normal angezeigt.




- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  und wählen Sie **Alle verbergen**, um alle Tasten zu verbergen:

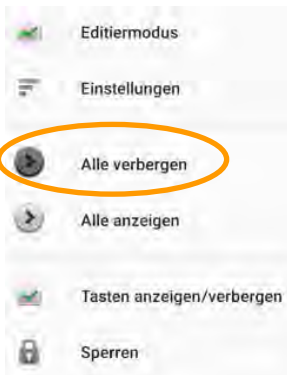

- Tippen Sie auf die Taste MENÜ  und wählen Sie **Alle anzeigen**, um alle Tasten wieder anzuzeigen:



- Tippen Sie auf die Taste MENÜ  und entfernen Sie den Haken bei **Tasten anzeigen/verbergen**, um das Verbergen/Anzeigen von Tasten zu beenden.

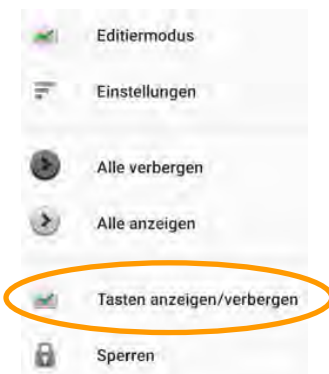

· Beenden Sie den **Editiermodus**.

Verborgene Tasten werden nicht mehr angezeigt:



VORGABEN


Vorgaben

Wenn Sie das Erscheinungsbild eines Vokabulars global verändern möchten (z.B. Labelschriftgröße, Seitenhintergrundfarbe etc.), brauchen Sie nicht jede Taste auf jeder Seite einzeln zu ändern. Mittels „Vorgaben“ können Sie das Erscheinungsbild global anpassen.

Vokabularvorgaben

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf einer Taste.
- Wählen Sie **Tastenvorgaben bearbeiten** oder **Seitenvorgaben bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Vokabular**.
- Wählen Sie das Element, das Sie bearbeiten wollen, und nehmen Sie die gewünschte Einstellung vor.

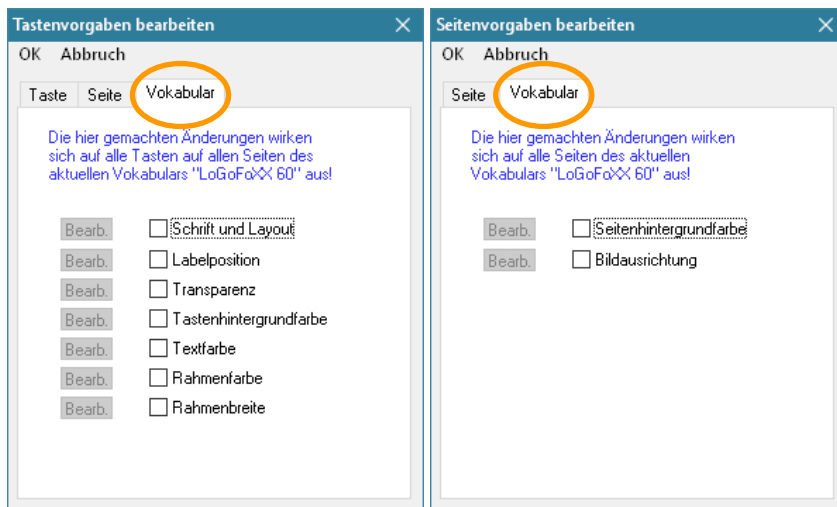



Die hier gemachten Einstellungen ändern nicht die den Seiten und Tastenfeldern individuell zugewiesenen Einstellungen. Diese werden lediglich im Moment der Anzeige der jeweiligen Seite überschrieben.

Sollen einzelne Seiten oder Tasten des Vokabulars ein anderes Erscheinungsbild benötigen, so können Sie die hier gemachten Vokabularvorgaben durch Seiten- bzw. Tastenvorgaben überschreiben.



Hinweis:

- Vokabularvorgaben überschreiben individuelle Tasteneinstellungen.
- Seitenvorgaben überschreiben Vokabularvorgaben.
- Tastenvorgaben überschreiben Seitenvorgaben.

NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und Halten Sie auf einer Taste.
- Wählen Sie **Tastenvorgaben bearbeiten** oder **Seitenvorgaben bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Vokabular**.

- Wählen Sie das Element, das Sie bearbeiten wollen, und nehmen Sie die gewünschte Einstellung vor.

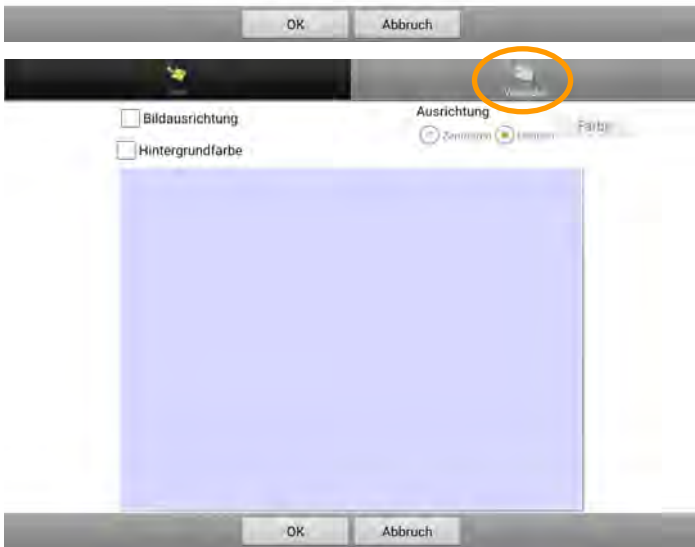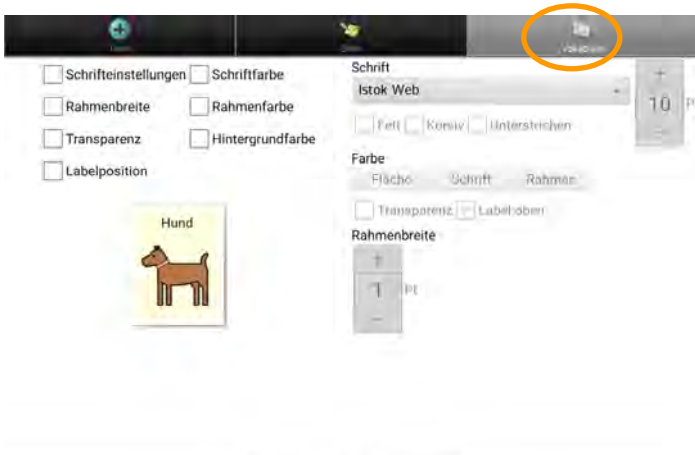

Die hier gemachten Einstellungen ändern nicht die den Seiten und Tastenfeldern individuell zugewiesenen Einstellungen. Diese werden lediglich im Moment der Anzeige der jeweiligen Seite überschrieben.

Sollen einzelne Seiten oder Tasten des Vokabulars ein anderes Erscheinungsbild benötigen, so können Sie die hier gemachten Vokabularvorgaben durch Seiten- bzw. Tastenvorgaben überschreiben.


Hinweis:

- Vokabularvorgaben überschreiben individuelle Tasteneinstellungen.
- Seitenvorgaben überschreiben Vokabularvorgaben.
- Tastenvorgaben überschreiben Seitenvorgaben.

Seitenvorgaben

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf einer Taste.
- Wählen Sie **Tastenvorgaben bearbeiten** oder **Seitenvorgaben bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Seite**.
- Wählen Sie das Element, das Sie bearbeiten wollen, und nehmen Sie die gewünschte Einstellung vor.

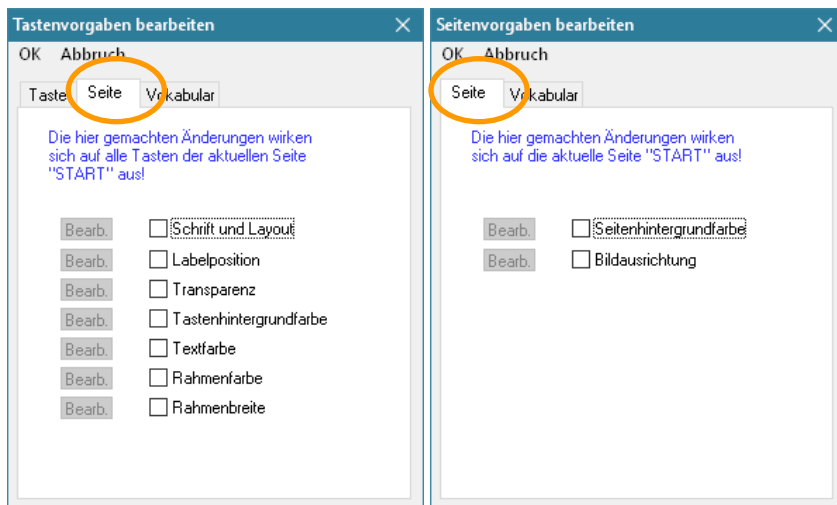



Die hier gemachten Einstellungen ändern nicht die den Seiten und Tastenfeldern individuell zugewiesenen Einstellungen. Diese werden lediglich im Moment der Anzeige der jeweiligen Seite überschrieben.



Sollen einzelne Tasten ein anderes Erscheinungsbild benötigen, so können Sie die hier gemachten Seitenvorgaben durch Tastenvorgaben überschreiben.

Hinweis:

- Vokabularvorgaben überschreiben individuelle Tasteneinstellungen.
- Seitenvorgaben überschreiben Vokabularvorgaben.
- Tastenvorgaben überschreiben Seitenvorgaben.

NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und Halten Sie auf einer Taste.
- Wählen Sie **Tastenvorgaben bearbeiten** oder **Seitenvorgaben bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Seite**.
- Wählen Sie das Element, das Sie bearbeiten wollen, und nehmen Sie die gewünschte Einstellung vor.

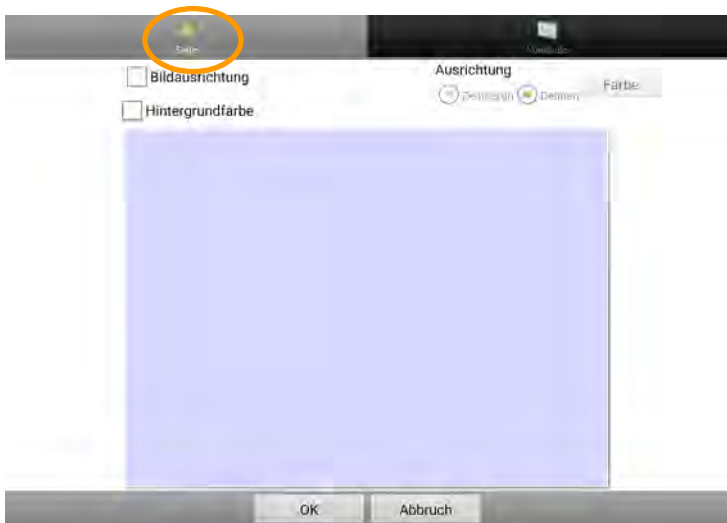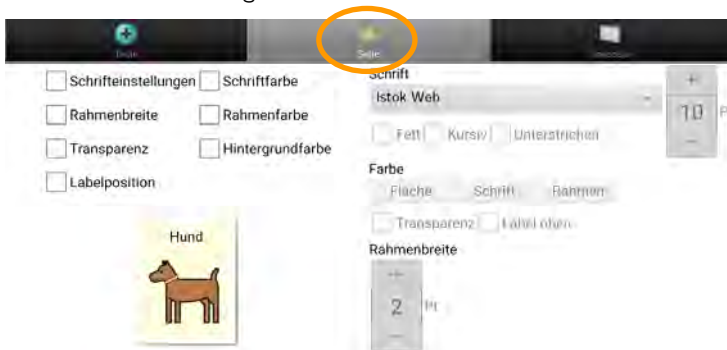

Die hier gemachten Einstellungen ändern nicht die den Seiten und Tastenfeldern individuell zugewiesenen Einstellungen. Diese werden lediglich im Moment der Anzeige der jeweiligen Seite überschrieben.

Sollen einzelne Tasten ein anderes Erscheinungsbild benötigen, so können Sie die hier gemachten Vokabularvorgaben durch Tastenvorgaben überschreiben.


Hinweis:

- Vokabularvorgaben überschreiben individuelle Tasteneinstellungen.
- Seitenvorgaben überschreiben Vokabularvorgaben.
- Tastenvorgaben überschreiben Seitenvorgaben.

Tastenvorgaben

Chat-Editor

- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Rechtsklicken Sie auf einer Taste.
- Wählen Sie **Tastenvorgaben bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Taste**.
- Wählen Sie das Element, das Sie bearbeiten wollen, und nehmen Sie die gewünschte Einstellung vor.

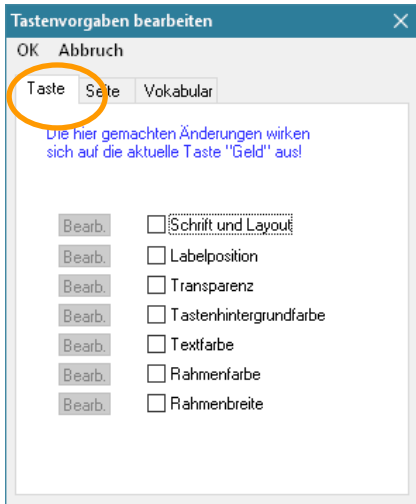



Die hier gemachten Einstellungen ändern nicht die dem Tastenfeld individuell zugewiesenen Einstellungen. Diese werden lediglich im Moment der Anzeige der jeweiligen Seite überschrieben.

Hinweis:

- Vokabularvorgaben überschreiben individuelle Tasteneinstellungen.
- Seitenvorgaben überschreiben Vokabularvorgaben.
- Tastenvorgaben überschreiben Seitenvorgaben.

NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wechseln Sie in den **Editiermodus**.
- Tippen und Halten Sie auf einer Taste.
- Wählen Sie **Tastenvorgaben bearbeiten**.
- Wählen Sie den Reiter **Taste**.
- Wählen Sie das Element, das Sie bearbeiten wollen, und nehmen Sie die gewünschte Einstellung vor.





Die hier gemachten Einstellungen ändern nicht dem Tastenfeld individuell zugewiesenen Einstellungen. Diese werden lediglich im Moment der Anzeige der jeweiligen Seite überschrieben.

Hinweis:

- Vokabularvorgaben überschreiben individuelle Tasteneinstellungen.
- Seitenvorgaben überschreiben Vokabularvorgaben.
- Tastenvorgaben überschreiben Seitenvorgaben.



Das Textfenster

Im Textfenster werden alle abgerufenen Mitteilungen in Textform gesammelt.


Chat-Editor

- Linksklicken Sie auf das Textfenster, um den gesamten im Textfenster enthaltenen Text erneut zu sprechen.
- Rechtsklicken Sie auf dem Textfenster, um das Kontextmenü anzuzeigen.



NovaChat-Gerät

- Durch einfaches Tippen auf das Textfenster wird der gesamte im Textfenster enthaltene Text gesprochen.
- Tippen und Halten Sie auf dem Textfenster, um das Kontextmenü anzuzeigen. Hinweis: Das Textfenster-Kontextmenü ist standardmäßig deaktiviert, siehe Seite 181 zum Aktivieren dieser Option.

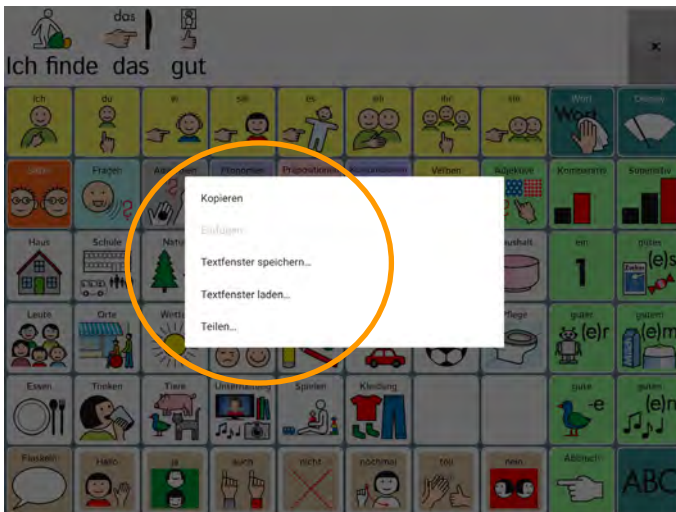

- Es stehen die Optionen *Kopieren*, *Einfügen*, *Textfenster speichern*, *Textfenster laden* zur Verfügung. Auf dem NovaChat-Gerät gibt es weiterhin die Option *Teilen* (außer bei geschlossenen Anlagen und bei aktiviertem Kiosk-Modus).
- Die Textfenster-Funktionen *Sprechen*, *Stopp*, *letzten Satz sprechen*, *Zeichen löschen*, *Wort löschen*, *Display löschen*, *Text auf Taste speichern*, *Textfenster – Text einfügen*, *Textfenster – Text freigeben*, *Textfenster – Text kopieren*, *Textfenster laden* und *Textfenster speichern* können auf Tasten gelegt werden.

Text auf Taste speichern


„Text auf Taste speichern“ ist eine Funktion, die Sie einer Taste zuweisen können. Mit dieser Funktion wird der gesamte Text im Textfenster auf der nächsten von Ihnen gewählten Taste gespeichert. Haben Sie eine Aussage formuliert, die Sie öfter abrufen wollen, so können Sie sie so einfach auf einer Taste speichern.

Wichtig: Legen Sie sich eine extra Seite für solche Aussage (z. B. „Sprüche“) an, die Sie zusammen mit dem Befehl auswählen.

Da es nicht möglich ist, leere (nicht definierte) Tastenfelder zum Speichern zu verwenden, definieren Sie alle Tastenfelder auf der Seite, auf der Textfensterinhalte gespeichert werden sollen, über „Neue Taste erstellen“ – OK.

Gestalten Sie eine Taste mit den Funktionen **Seite anzeigen (Sprüche)** und **Text auf Taste speichern** (siehe S. 82 ff für das Gestalten von Tasten).

Haben Sie eine Aussage formuliert, die Sie gerne aufheben möchten, so aktivieren Sie die mit „Text auf Taste speichern“ belegte Taste.
Das NovaChat-Gerät wechselt auf die Seite „Sprüche“.
Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja** bzw. **OK**:

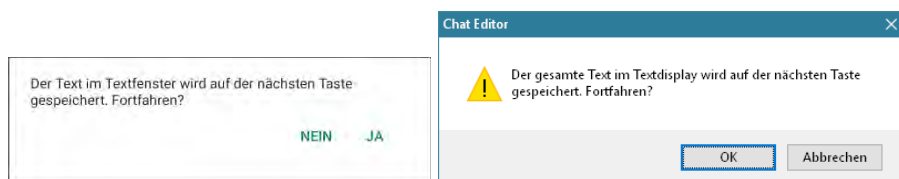

Wählen Sie eine Taste aus. Die Aussage wird dort gespeichert.

Vorsicht: ein eventuell bestehender Inhalt der Taste geht verloren!


Textfenster speichern

Mit dieser Funktion wird der gesamte Text im Textfenster als Textdatei im Nova-Chat-Gerät gespeichert.

Gestalten Sie eine Taste mit der Funktion **Textfenster speichern** (siehe S. 82 ff für das Gestalten von Tasten).

Haben Sie eine Aussage formuliert, die Sie gerne speichern möchten, so aktivieren Sie die mit „Textfenster speichern“ belegte Taste.

Ein Fenster mit der Eingabemöglichkeit für einen Dateinamen wird angezeigt:

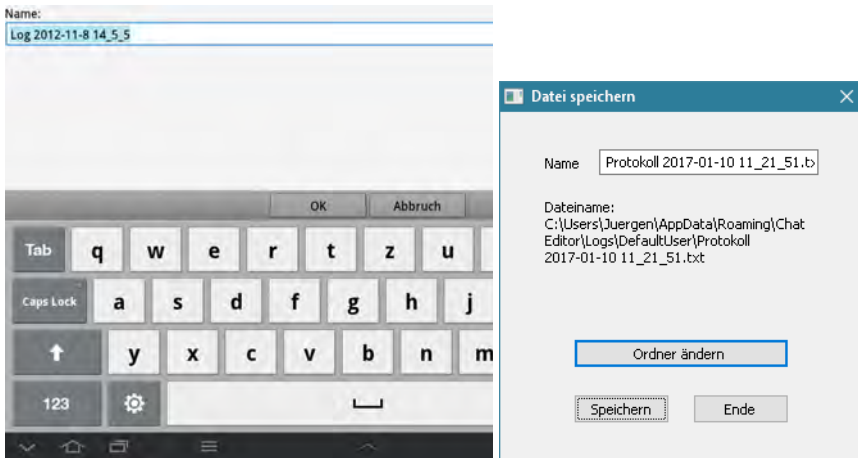

Übernehmen sie den vorgeschlagenen Dateinamen oder geben Sie einen eigenen ein.


Textfenster laden

Mit dieser Funktion wird ein vorher mittels „Textfenster speichern“ gespeicherter Text geladen und im Textfenster angezeigt.

Gestalten Sie eine Taste mit der Funktion **Textfenster laden** (siehe S. 82 ff für das Gestalten von Tasten).

Möchten Sie eine als Textdatei gespeicherte Aussage laden und anzeigen, so aktivieren Sie die mit „Textfenster speichern“ belegte Taste.

Ein Fenster mit der Eingabemöglichkeit für einen Dateinamen wird angezeigt:

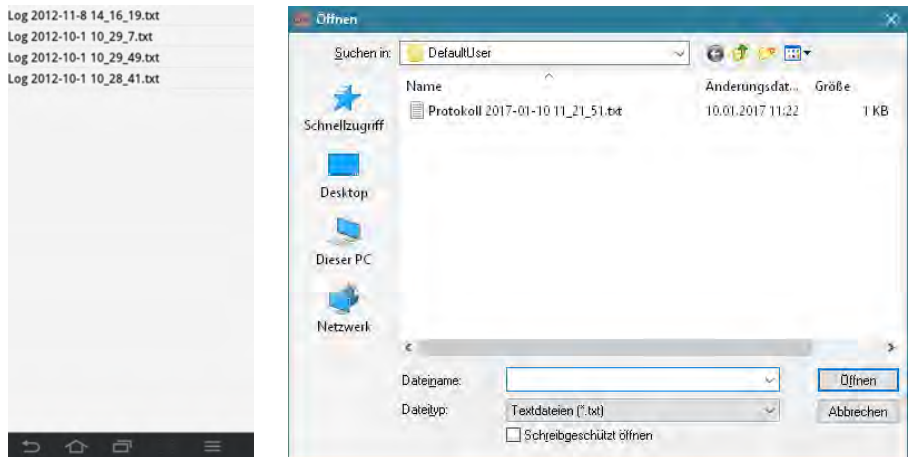

Wählen Sie die Datei aus, die Sie laden und anzeigen möchten.

Textfenster – Text kopieren

Mit dieser Funktion wird der Text im Textfenster in die Zwischenablage kopiert.

Gestalten Sie eine Taste mit der Funktion **Textfenster – Text kopieren** (siehe S. 82 ff für das Gestalten von Tasten).

Aktivieren Sie die mit „Textfenster – Text kopieren“ belegte Taste, um den aktuell im Textfenster befindlichen Text in die Zwischenablage zu kopieren.

Textfenster – Text einfügen

Mit dieser Funktion wird der Text in der Zwischenablage ins Textfenster kopiert.

Gestalten Sie eine Taste mit der Funktion **Textfenster – Text einfügen** (siehe S. 82 ff für das Gestalten von Tasten).

Aktivieren Sie die mit „Textfenster – Text einfügen“ belegte Taste, um den aktuell in der Zwischenablage befindlichen Text ins Textfenster zu kopieren.

Textfenster – Text teilen


Die Funktion steht nur auf dem NovaChat-Gerät zur Verfügung.

Diese Funktion kann nicht ausgeführt werden, wenn das NovaChat-Gerät als geschlossene Anlage konfiguriert oder der Kiosk-Modus aktiviert ist.

Mit dieser Funktion wird der Text im Textfenster für die Verwendung in anderen Android-Anwendungen freigegeben, d.h. an die gewählte Anwendung geschickt.

Gestalten Sie eine Taste mit der Funktion **Textfenster – Text teilen** (siehe S. 82 ff für das Gestalten von Tasten).

Aktivieren Sie die mit „Textfenster – Text teilen“ belegte Taste, um den aktuell im Textfenster befindlichen Text an eine andere Android-Anwendung zu schicken, die dieses Protokoll unterstützt.

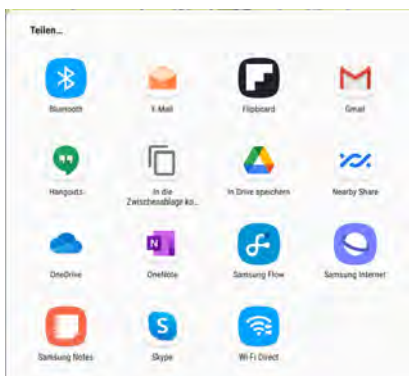

Wählen Sie die gewünschte Android -Anwendung aus. Die Anwendung wird geöffnet und Ihr Text steht dort zur Verfügung.

EINSTELLUNGEN

Hinweis: Viele der im Menü *Einstellungen* wählbaren Parameter können Sie auch im Chat-Editor bearbeiten. Da die Einstellungen aber in der Regel auf dem NovaChat-Gerät vorgenommen werden (einige Einstellungen stehen überhaupt nur auf dem NovaChat-Gerät zur Verfügung), erfolgt die Beschreibung der meisten Einstellungen nur für das NovaChat-Gerät.

Ansteuerung	
Verzögerungszeiten, Textfensteroptionen, alternative Ansteuerungsmethoden, Gesten und Neigen	
Sprachausgabe	
Stimme, automatisches Sprechen und mehr	
Textbausteine	
Textbausteine verwalten	
Schreibhilfen	
Wortvorhersage, Großschreibung und mehr	
Layout	
Farben, Schrift und Layout anpassen	
Wortsuche	
Funktion Wortsuche und Anzeige-Intervall bearbeiten	
Menüsperre	
Passwortschutz	
Profile	
Profile verwalten	
Sprache	
Sprache der Benutzeroberfläche ändern	
System	
Systemeinstellungen	
Sprachdatenaufzeichnung	
Aufzeichnung der mit dem Gerät erzeugten Aussagen zur späteren Analyse	

Ansteuerung

Sie können die Ansteuerung des NovaChats an die motorischen Fähigkeiten des Benutzers anpassen.

- Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.
- Wählen Sie **Ansteuerung**.

Alternative Ansteuerung

Verzögerungszeiten

Mit Hilfe von einstellbaren Verzögerungszeiten können Sie die Empfindlichkeit des Touchscreens anpassen.

Legen Sie die Zeit fest, wie lange eine Taste gedrückt werden muss, damit sie als gedrückt akzeptiert wird (Drückdauer).

Legen Sie eine Zeit fest, wie lange die Taste losgelassen werden muss, bevor neue Eingaben akzeptiert werden (Loslassdauer).

- Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.
- Wählen Sie **Ansteuerung**
- Wählen Sie **Verzögerungszeiten**.




Drückdauer

- Wählen Sie **Drückdauer**, wenn Sie eine Drückdauer einstellen wollen.
 - Setzen Sie den Haken bei **Aktivieren**. Tippen Sie auf **Verzögerungszeit**.
 - Stellen Sie die gewünschte Zeit ein. Zur Auswahl stehen Zeiten von 0,1 bis 3,0 Sekunden.

Loslassdauer

- Wählen Sie **Loslassdauer**, wenn Sie eine Loslassdauer einstellen wollen.
 - Setzen Sie den Haken bei **Aktivieren**. Tippen Sie auf **Verzögerungszeit**.
 - Stellen Sie die gewünschte Zeit ein. Zur Auswahl stehen Zeiten von 0,1 bis 3,0 Sekunden.

Beim Loslassen aktivieren

- Markieren Sie die Option **Beim Loslassen aktivieren**, wenn Sie möchten, dass ein Tastenfeld erst beim Loslassen aktiviert wird.
- Verlassen Sie ein Menü durch mehrmaliges Tippen auf zurück .

Scanning

- Diese Einstellungen können Sie nur auf dem NovaChat-Gerät vornehmen.
- Schließen Sie ggf. eine oder zwei Tasten an das NovaChat-Gerät an (schlagen Sie wenn nötig im Handbuch zum NovaChat-Gerät nach).

Scanning aktivieren

- Wählen Sie **Ansteuerung – Scanning**.
- Setzen Sie den Haken bei **Scanning aktivieren**, um Scanning als Ansteuerung zu aktivieren.

Scanning aktivieren

Scanning ein-/auschalten

Ansteuerung mit Tasten

Ermöglicht die Nutzung per Scanning mit externen Tasten

Muster

Wählen Sie ein Scanmuster

Scangeschwindigkeit

Scanzzeiten einstellen



Ansteuerung mit Tasten

Sie können Scanning benutzen mit

- einer oder zwei an die Tastenbuchsen des NovaChats angeschlossenen Taste(n)
- dem Touchscreen (Tippen auf den Bildschirm wird als Tastendruck gewertet)
- einer per Bluetooth gekoppelten Einer- oder Zweiertaste.

Tasten konfigurieren

1- und 2-Tasten-Scanning konfigurieren

Auto-Scan

Scanning erfolgt automatisch, bis eine Taste betätigt wird

Taste 1: Scanning starten / auswählen

Touchscreen-Tippen

Taste 2: Nicht benutzt

1 oder 2-Tasten-Scanning



Tasten konfigurieren

So konfigurieren Sie ihre Tasten(n):

- Wählen Sie **Ansteuerung – Scanning – Ansteuerung mit Tasten**.
- Wählen Sie **Tasten konfigurieren**.
- Wählen Sie, ob Sie mit 1 oder mit 2 Tasten scannen wollen.



Weisen Sie Ihre Taste(n) zu.

- Wählen Sie **Taste 1: Scanning starten/auswählen** (bei 1-Tasten-Scanning) bzw. **Taste 1: Scanning starten/anhalten** (bei 2-Tasten-Scanning)
- Betätigen Sie die Taste, die diese Funktion übernehmen soll. Tippen Sie auf das Display, wenn Sie das Display als Taste 1 verwenden wollen.
- Falls Sie 2-Tasten-Scanning verwenden: Wählen Sie **Taste 2: Auswählen**.

- Betätigen Sie die Taste, die diese Funktion übernehmen soll. Tippen Sie auf das Display, wenn Sie das Display als Taste 2 verwenden wollen.


Auto-Scan

- Setzen Sie den Haken bei **Auto-Scan**, wenn die das Scanning (die Auswahl) automatisch weiterlaufen soll, auch wenn keine Taste gedrückt wird.

Scanning mit externer Tastatur

- Stellen Sie ein, welche Tasten der Standardtastatur die per Bluetooth verbundenen externen Tasten an den NovaChat übermitteln. Voreingestellt sind die Leertaste (Space) und Eingabetaste (Enter).

Taste 1.1 [SPACE]
Taste 2.1 [ENTER]

Verlassen Sie ein Menü durch mehrmaliges Tippen auf zurück .

Muster

- Stellen Sie hier ein, in welchem Muster die Seiten durchlaufen werden sollen.
- Wählen Sie **Ansteuerung – Scanning – Muster**.



Muster: Wählen Sie ein Scanmuster aus.

Linear	<input checked="" type="radio"/>
Zeile/Spalte	<input type="radio"/>
Block	<input type="radio"/>
Dynamisch	<input type="radio"/>

- **Linear:** die Felder einer Seite werden nacheinander Feld für Feld von links nach rechts und von oben nach unten durchlaufen. Wählen Sie dieses Scanning, wenn die Seiten über eine geringe Anzahl von Tastenfeldern verfügen.
- **Zeile/Spalte:** die Felder einer Seite werden zuerst zeilenweise und nach Auswahl einer Zeile von links nach rechts durchlaufen. Bei sehr großer Anzahl von Tasten-

feldern ist vermutlich die Nutzung von Block- oder dynamischen Scanning sinnvoller.

Block: Der Block-Modus beschleunigt das Scanning bei Seiten mit hoher Anzahl von Tastenfeldern, allerdings benötigen Sie mehr Tastenbetätigungen. Definieren Sie die Blöcke von Tastenfeldern, die zunächst als Einheit angeboten und ausgewählt werden. Bei 2 vertikalen und 2 horizontalen Blöcken wird jede Seite in 4 Bereiche unterteilt, die nacheinander gescannt werden:

markierter Block



Blöcke werden mit den in „Visuelle Effekte“ gemachten Einstellungen dargestellt bzw. hervorgehoben (Rahmen, durchscheinende Markierung, Vergrößerung). Setzen Sie den Haken bei „In Gruppe Zeilen/Spalten-Scanning verwenden“, um innerhalb eines Blockes das gewünschte Tastenfeld im Zeile/Spalte-Scanning auszuwählen. Ansonsten werden Blöcke ebenfalls blockweise durchlaufen

			1					2	
		3						4	

Scanning nach Auswahl von Block „2“ im Blockscanning:

							1		2	
							3		4	

Scanning nach Auswahl von Block „2“ im Zeile/Spalte-Scanning:

					1				
					2				
					3				
					4				

· **Dynamisch:** im Scanning-Modus „Dynamisch“ werden Felder linear gruppiert. Die Größe einer Gruppe hängt ab von der Zahl der Tastenfelder einer Seite und der gewählten Zahl von Gruppen. Die Zahl der Tastenfelder in einer Gruppe kann ungerade sein und über Zeilen hinausreichen.

markierte Gruppe



Haben Sie Seiten mit 8x10 Feldern und 6 Gruppen definiert, wird jede Gruppe aus 13 bzw. 14 Tastenfeldern bestehen ($80/6=13,33$).


1									
				2					
							3		
4									
				5					
						6			








Nach Auswahl einer Gruppe erfolgt das Scanning der Felder der Gruppe ebenfalls in 6 Gruppen. Im Beispiel besteht der 2. Block aus 13 Feldern, die in fünf Gruppen à 2 und einer Gruppe à 3 Feldern durchlaufen werden:

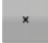			1		2		3		4
	5			6					

Scan-Optimierung: Setzen Sie hier einen Haken, wenn der NovaChat die Blöcke bei Block-Scanning bzw. die Gruppen bei dynamischen Scanning optimieren soll. In dem die ersten Blöcke/Gruppen mehr Tastenfelder enthalten und die letzten weniger, kann die durchschnittliche Zahl der Schritte zum Erreichen eines Feldes verringert werden.

Textfenster scannen: Setzen Sie hier einen Haken, wenn auch das Textfenster gescannt werden soll.

Taste ‚Löschen‘ scannen: Setzen Sie hier einen Haken, wenn auch die im Textfenster einblendbare Lösch taste  gescannt werden soll.

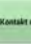Benachrichtigungen scannen: Setzen Sie hier einen Haken, wenn auch die im Textfenster ggf. eingeblendeten Benachrichtigungen zu Textnachrichten (SMS)  
     gescannt werden sollen.

Leere Felder überspringen: Setzen Sie hier einen Haken, wenn leere Felder beim Scanning übersprungen werden sollen.

Scangeschwindigkeit

- Stellen Sie hier ein, in welcher Geschwindigkeit die Auswahl durch die Seite laufen soll.
- Wählen Sie **Ansteuerung – Scanning – Scangeschwindigkeit**.



Scangeschwindigkeit: Wählen Sie die Zeit zwischen zwei Scanschritten. Mögliche Werte sind 0,1 Sek. bis 10,0 Sek. Je kürzer die eingestellte Zeit, desto schneller ist das Scanning.

Anzahl der Durchläufe: Wählen Sie, wie oft die Seite durchlaufen wird, wenn keine Eingaben gemacht werden. Mögliche Werte sind 0 bis 10 Durchläufe.

Rücknahmeoption: Aktivieren Sie die Rücknahmeoption, wenn Sie nach dem Betätigen der Taste die Möglichkeit haben wollen, die gerade gemachte Eingabe zu stornieren, indem Sie die Taste erneut betätigen. Wählen Sie die Zeit, die Sie warten möchten, um Selektion wieder rückgängig zu machen zu können.

Hinweis: Die gewählte Zeit verlangsamt das Scanning, da dieses erst nach Ablauf der Rücknamezeit fortgesetzt wird. Um die Rücknahmeoption zu deaktivieren, wählen Sie eine Zeit von 0,0 Sek.



Auto-Restart: Setzen Sie hier einen Haken, wenn das Scanning nach Auswahl eines Feldes automatisch fortgesetzt werden soll.

Visuelle Effekte

Bei indirekter Selektion (Scanning, Headpointing) steht eine Reihe von Rückmeldungen und Parametern zur Verfügung, die Sie hier konfigurieren können.



Rahmen

Wenn gewählt, wird der zu scannende bzw. ausgewählte Bereich durch einen Rahmen visualisiert.



Zeilenscanning

mittels Rahmen hervorgehobene Zeile

Rahmenfarbe

Wählen Sie eine Farbe für den Scanning-Rahmen.

Rahmenbreite

Wählen Sie die Breite des Scanning-Rahmens. Mögliche Werte sind 1 - 24 Punkt.

Durchscheinende Markierung

Wenn gewählt, wird der zu scannende bzw. ausgewählte Bereich durch eine transparente Markierung visualisiert.




Zeilenscanning

mittels Markierung hervorgehobene Zeile

Transparenz der Markierung

Wählen Sie den Grad der Transparenz der Markierung. Mögliche Werte sind 0 - 100%. Bei 0% ist die Markierung nicht sichtbar, bei 100% sind die Felder des markierten Bereichs nicht mehr sichtbar.

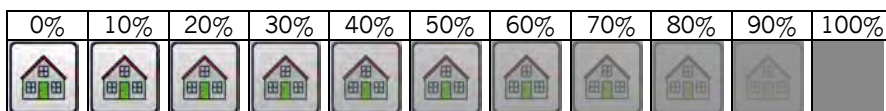

Farbe der Markierung

Wählen Sie eine Farbe für die Markierung.

Farben invertieren

Setzen Sie hier einen Haken, wenn Tastenfelder im hervorgehobenen Bereich invertiert dargestellt werden sollen.

Tasten in der normalen Ansicht:



Tasten in der invertierten Ansicht:



Vergrößern

Setzen Sie den Haken bei **Vergrößern**, wenn der hervorgehobene Bereich vergrößert dargestellt werden soll.

Vergrößerungsfaktor

Wählen Sie einen **Vergrößerungsfaktor**. Mögliche Werte sind 100 - 300%. Wählen Sie die Vergrößerung nicht zu groß, weil sich sonst die Felder einer Zeile, eines Blocks oder einer Gruppe zu sehr überlagern.



Zeilenscanning

mittels 150% Vergrößerung
hervorgehobene Zeile



Zeilenscanning

mittels 150% Vergrößerung
hervorgehobenes Feld

Animierung

Setzen Sie den Haken bei **Animierung**, wenn der hervorgehobene Bereich animiert dargestellt werden soll.

Animierung

Die gewählten visuellen Effekte werden animiert



- Rahmen werden bei aktivierter Animierung ein- und ausgeblendet.
- Die durchscheinende Markierung erscheint bei aktivierter Animierung in der Feldmitte, vergrößert sich dann bis auf Tastengröße und schrumpft anschließend wieder.



- Bei "Farben invertieren" erscheint bei aktivierter Animierung zunächst eine graue, intransparenter werdende Markierung, dann die Invertierung und anschließend wieder eine graue, transparenter werdende Markierung.

Ansagen

Ansagen ermöglichen Menschen mit visuellen Problemen eine bessere Orientierung auf dem Gerät.

- Wählen Sie **Ansteuerung – Scanning – Ansagen**.



Ansagen aktivieren: Setzen Sie den Haken, um Ansagen zu aktivieren.

Ausgabegerät: Legen Sie fest, worüber die Ansagen ausgegeben werden sollen:

- **Lautsprecher:** die Ansagen werden über den externen Lautsprecher wiedergegeben.
- **Kopfhörer:** die Ansagen werden über einen Kopfhörer wiedergegeben. Schließen Sie einen Kopfhörer an das NovaChat-Gerät an.

Kopfhörer-Lautstärke (nur bei Ausgabegerät = Kopfhörer): Wählen Sie die Kopfhörer-Lautstärke.

Scan-Piepton: Setzen Sie den Haken bei wenn beim Scannen eines Blocks anstelle einer Ansage ein Piepton ertönen soll.

Tastenansage (nur bei Scan-Piepton = aus):

- **Label sprechen:** das Tastenlabel wird gesprochen.
- **Mitteilung sprechen:** die Mitteilung wird gesprochen.

Spracheinstellungen (nur bei Scan-Piepton = aus):

- Wählen Sie die synthetische Stimme, die für Ansagen verwendet werden soll.

Verlassen Sie ein Menü durch mehrmaliges Tippen auf zurück .

Drücken & Finden

„Drücken & Finden“ ermöglicht das Finden der gewünschten Taste durch Ausprobieren. Menschen mit visuellen Problemen kann diese Funktion die Orientierung auf dem Gerät erleichtern. Ist die Funktion aktiviert, erfolgt beim Drücken einer Taste zunächst noch keine Auswahl, sondern die Taste wird visuell hervorgehoben und – sofern Ansagen aktiviert wurden – angesagt. Zum Auslösen ist dieselbe Taste erneut zu betätigen.

Gesten

- Schalten Sie die Gestenerkennung ein, wenn Sie Gesten benutzen (zur Nutzung von Gesten siehe Seite 65).
- Wenn Sie Gesten benutzen, können Sie keine Verzögerungszeiten nutzen!


Tastatur

Neigen

- Legen Sie fest, was passiert, wenn Sie das NovaChat-Gerät drehen bzw. neigen. Diese Einstellung können Sie nur auf dem NovaChat-Gerät vornehmen.

NovaChat-Gerät


- Wählen Sie **Einstellungen - Ansteuerung - Neigen**.

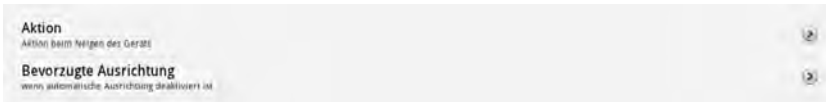

Aktion

- Legen Sie fest, welche **Aktion** beim Neigen des Gerätes ausgeführt soll. Mögliche Optionen sind:
 - **Maximieren und Sprechen** (Text im Textfenster wird auf Displaygröße vergrößert und über die Sprachausgabe wiedergegeben).
 - **Nur Maximieren** (Text im Textfenster wird auf Displaygröße vergrößert).
 - **Automatische Ausrichtung** (die Anzeige der Seite wechselt von Querformat auf Hochformat und zurück).
 - **Keine Aktivität**.

Bevorzugte Ausrichtung


- Wählen Sie **Bevorzugte Ausrichtung**.
 - Legen Sie fest, ob das NovaChat-Gerät im **Hochformat** oder im **Querformat** genutzt werden soll. Alle Vokabulare nutzen das Querformat.
- Verlassen Sie ein Menü durch mehrmaliges Tippen auf zurück .

Tastenpiepton

- Wenn aktiviert, wird ein Tastendruck mit einem kurzen Piepton bestätigt.

Tastendruck

Wählen Sie, wie ein Tastendruck visualisiert werden soll.

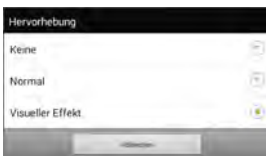

- **Keine**: Es erfolgt keine Visualisierung
- **Normal**: die Taste erhält beim Drücken einen roten Hintergrund.
- **Visueller Effekt**: es werden die unter „Alternative Ansteuerung“ definierten visuellen Effekte (Rahmen, durchscheinende Markierung, Vergrößern etc) verwendet (siehe S. 176).

Verborgene Tasten anzeigen

- Wenn aktiviert, werden verborgene Tasten angezeigt.

Textfenster

Tippen = Sprechen

- Wenn aktiviert, wird durch Tippen auf das Textfenster der gesamte Text im Textfenster gesprochen.

Tippen = Maximieren

- Wenn aktiviert, wird durch Tippen auf das Textfenster der gesamte Text im Textfenster auf Displaygröße vergrößert.

Menü aktivieren

- Wenn aktiviert, wird durch Tippen und Halten auf dem Textfenster das Textfenster-Kontextmenü geöffnet.



Feld ‚Löschen‘ (X) einblenden

- Wenn aktiviert, wird oben rechts im Textfenster das Symbol für Wort löschen / Display löschen eingeblendet.



- Durch Tippen auf das Symbol wird das letzte Wort gelöscht.
- Durch Tippen und Halten auf dem Symbol wird das gesamte Textfenster gelöscht.

Benachrichtigungszeile anzeigen

- Wenn aktiviert, werden oben rechts im Textfenster Benachrichtigungen zu Textnachrichten (SMS)        angezeigt.

Kopfmaus (Headpointer)

Das Modell ChatFusion ist optional mit interner Kopfmaus (Headpointer) „Chat-Point“ erhältlich. Eine Kopfmaus erlaubt die Steuerung des Geräts nur mittels Kopfbewegungen.

Die Optionen des Menüs „Kopfmaus“ (Headpointer) werden nur angezeigt, wenn die Kopfmaus ChatPoint an den ChatFusion angeschlossen ist.

Kopfmaus aktivieren
Kopfmaus ein/aus

Verweildauer
Die zum Auslösen benötigte Zeit

Horizontale Empfindlichkeit
Wählen Sie, wie empfindlich der Indikator horizontalen Kopfbewegungen (links/rechts) folgt

Vertikale Empfindlichkeit
Wählen Sie, wie empfindlich der Indikator vertikalen Kopfbewegungen (hoch/runter) folgt

Visuelle Effekte
Wählen Sie visuelle Effekte für den Indikator

Steuerfelder anzeigen
Felder zum Pausieren & Navigieren einblenden

Ruhezone
Ein inaktiver Bereich rund um den Punkt der letzten Auswahl, der es ermöglicht auszuruhen, bevor weitere Eingaben gemacht werden.

Erweitert
Erweiterte Einstellungen

Kopfmaus aktivieren

Setzen Sie hier einen Haken, wenn die Kopfmaus ChatPoint zur Ansteuerung verwendet werden soll.

Verweildauer

Wählen Sie die Zeit aus, die Sie mit dem Indikator auf einem Tastenfeld bleiben müssen, damit es ausgewählt wird. Mögliche Werte sind 0,3 bis 10,0 Sekunden, einstellbar in 0,1-Sekunden-Schritten.

Horizontale Empfindlichkeit

Wählen Sie, wie empfindlich der Indikator (Zeiger) Ihren waagerechten Kopfbewegungen folgt. Mögliche Werte sind 0 bis 10.

Vertikale Empfindlichkeit

Wählen Sie, wie empfindlich der Indikator (Zeiger) Ihren senkrechten Kopfbewegungen folgt. Mögliche Werte sind 0 bis 10.

Visuelle Effekte

Wählen Sie, wie der Indikator („Mauszeiger“) visualisiert werden soll.




- **Transparenz des Indikators:** Wählen Sie, wie durchscheinend der Indikator sein soll. Mögliche Werte sind 20% (sehr transparent) bis 100% (nicht transparent).
- **Indikatorfarbe:** Wählen Sie in die Farbe des Indikators.
- **Indikatorgröße:** Wählen Sie die Größe des Indikators. Mögliche Werte sind 1 (ca. 5 mm) bis 10 (ca. 15 mm).
- **Indikatorform:** Wählen Sie die Form des Indikators.
 - **Animierter Kreis:** Der Indikator hat die Form eines Kreises. Dieser wird zunächst in voller Größe angezeigt und dann im Verlauf der Verweildauer immer kleiner.
 - **Pfeil:** Der Indikator hat die Form eines Pfeils.
- **Indikator verbergen:** Setzen Sie einen Haken, um den Indikator zu deaktivieren.


Steuerfelder anzeigen

Bei Ansteuerung mit Headpointer (Kopfmaus) können Sie oben ein Feld zum Pausieren / Fortsetzen der Ansteuerung einblenden lassen.

Benötigen Sie die Navigationsleiste , so können Sie diese vergrößert unten im Display anzeigen lassen.

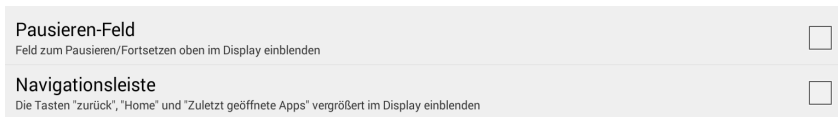

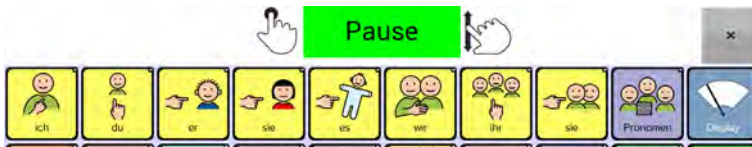

Pausieren-Feld: Setzen Sie einen Haken, um oben in der Displaymitte ein Feld zum Pausieren / Fortsetzen und zum Umschalten der Auswahlart angezeigt zu bekommen. Zur Anzeige und Auswahl dieses Feldes schauen Sie in Richtung der vorderen Kamera in der Mitte über dem Display des ChatFusion. Das Feld „Klicken / Pause / Ziehen“ erscheint im Textfenster.



- Wählen Sie , um ein ausgewähltes Feld nach Ablauf der Verweildauer zu selektieren (Standard)


Pause

- Wählen Sie , um die Ansteuerung mittels Kopfmaus pausieren zu lassen. Indikator und Hervorhebung des ausgewählten Feldes funktionieren weiterhin, es wird aber nichts ausgelöst

- Wählen Sie , um ein ausgewähltes Feld nach Ablauf der Verweildauer zu verschieben

- Zur Fortsetzung der Ansteuerung schauen Sie erneut auf das „virtuelle Feld“ in Richtung der vorderen Kamera des ChatFusion. Das Feld „Pausierend“ erscheint im Textfenster. Bleiben Sie auf dem Feld, bis es in „Aktiv“ wechselt.



- **Navigationsleiste:** Setzen Sie einen Haken, um die Navigationsleiste  vergrößert im unteren Bereich des Displays angezeigt zu bekommen, sobald Sie auf die entsprechenden Symbole schauen.



Ruhezone

Die Ruhezone erlaubt das Ausruhen von bzw. Pausieren der Ansteuerung im Bereich der letzten Auswahl. Setzen Sie die Größe der Ruhezone auf „0“, wenn Sie keine Ruhezone verwenden wollen.




- **Ruhezone anzeigen:** Wenn Sie den Haken setzen, wird die Ruhezone durch einen Kreis visualisiert.
- **Größe der Ruhezone:** Wählen Sie die Größe der Ruhezone. Mögliche Werte sind 0 (nicht vorhanden), 1 (ca. 7 mm) bis 10 (ca. 60 mm). Ist die Ruhezone zu klein, kann es schwer sein, in ihr zu bleiben. Ist sie sehr groß, müssen Sie sie aktiv verlassen, um mit der Ansteuerung fortzufahren.
- **Taste als Ruhezone verwenden:** Setzen Sie einen Haken bei dieser Option, um stets die gesamte zuletzt selektierte Taste als Ruhezone nutzen zu können. Die Einstellung „Größe der Ruhezone“ wird dann innerhalb der Anwendung „Chat“ ignoriert.

Hinweis: wenn Sie die Option „Taste als Ruhezone verwenden“ aktiviert haben, gilt die hier gemachte Einstellung nur für die Ansteuerung in Chat, nicht in Android.

Erweitert


Die erweiterten Einstellungen ermöglichen die Anpassung der Empfindlichkeit der Kopfmaus sowie der Ansteuerung in Android.


- **Glättung:** Falls es durch unwillkürliche Kopfbewegungen (Zittern, Wackeln) zu Fehlauslösern der Kopfmaus kommt, können Sie hier eine Glättung des Signals einstellen. Wählen Sie die Glättung nur so gering wie nötig. Bei hoher Glättung kommt es zu einer Verzögerung der Indikatorbewegung relativ zu Ihrer Kopfbewegung. Mögliche Werte sind 1 (keine Glättung) bis 5 (maximale Glättung).
- **Verweilmethode:** Wenn Sie mit der Kopfmaus auch Android-Anwendungen steuern möchten, können Sie hier den außerhalb von Chat verwendeten Mausmodus einstellen. Jede Verweilmethode hat ihre spezifischen Symbole.

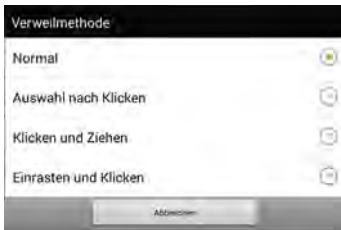




- **Normal:** Dies ist die Standard-Verweilmethode. Innerhalb der Chat-Anwendung steht nur diese Verweilmethode zur Verfügung. Der Indikator wird durch einen Kreis symbolisiert. Der Kreis wird kleiner und signalisiert damit das Ablaufen der Verweildauer. Zusätzlich wird das zugehörige Tastenfeld durch einen Rahmen hervorgehoben. Nach Ablauf der Verweildauer wird an der Position eine „Tippen“-Aktion ausgelöst.



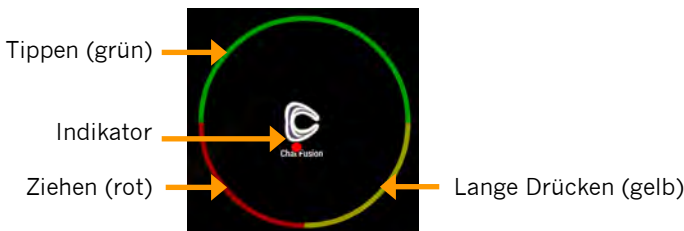


- **Auswahl nach Klicken** (diese Methode können Sie nur außerhalb von Chat verwenden): nach Auswahl eines Punktes auf dem Display werden kreisförmig 3 mögliche Aktionen angeboten: **Tippen** auf der Indikatorposition (grüner Kreisbogen), **Ziehen** von der Indikatorposition (roter Kreisbogen) und **Lange Drücken** auf der Indikatorposition (gelber Kreisbogen). Zur Auswahl einer der 3 Aktionen ist der Indikator einfach nach oben, links oder rechts aus dem Kreis heraus zu bewegen. Im Falle des „Ziehens“ nimmt der Indikator anschließend die Form eines Kreuzes  an. Ziehen Sie das ausgewählte Objekt an den gewünschten Platz. Warten Sie die zweite Verweildauer ab. Das Objekt wird auf die ausgewählte Position verschoben.



- **Klicken und Ziehen** (diese Methode können Sie nur außerhalb von Chat verwenden): Diese Methode ermöglicht Ziehen bzw. Wischen. Zunächst wird der Indikator als gefüllter, kleiner werdender Kreis angezeigt . Nach Ablauf der zweiten Verweildauer wird der Indikator als größer werdender Hohlkreis mit Punkt angezeigt . Wird der Indikator vom ausgewählten Objekt entfernt,

nimmt er die Form eines Kreuzes an . Ziehen Sie das ausgewählte Objekt an den gewünschten Platz.

- **Einrasten und Klicken** (diese Methode können Sie nur außerhalb von Chat verwenden): Diese Methode ermöglicht die Aktionen „Lange Drücken“ und Ziehen eines Objekts. Zunächst wird der Indikator als gefüllter, kleiner werdender Kreis angezeigt . Nach Ablauf der Verweildauer wird der Indikator für die Dauer der zweiten Verweildauer als Uhr angezeigt . Wird der Indikator in diesem Zustand vom ausgewählten Objekt entfernt, wird ein Tippen auf dem Objekt durchgeführt. Wird der Indikator dagegen nicht vom Objekt wegbewegt, nimmt er wieder seine ursprüngliche Form an. Anschließend schrumpft der Kreis. Hat er seine minimale Größe  erreicht, wird ein Tippen auf dem Objekt durchgeführt.
- **Zweite Verweildauer:** Wählen Sie die zweite Verweildauer für die Verweilmethode „Klicken und Ziehen“ und „Einrasten und Klicken“.
- **Mittlung:** Wenn Sie Probleme haben, den Indikator innerhalb eines Tastenfeldes zu fokussieren, können die Mittlung einschalten.
- **Details anzeigen:** Ist diese Option aktiviert, können Sie sehen, wie die Mittlung funktioniert.

Sprachausgabe

In dem Menü Sprachausgabe können Sie festlegen, welche Synthese und Stimme verwendet werden und wann eine Sprachausgabe erfolgen soll.

- Öffnen Sie das Menü **Einstellungen > Sprachausgabe**.



Sprachsynthese

- Wählen Sie **Sprachsynthese**.



Synthesizer

- Öffnen Sie das Menü **Synthesizer** und wählen Sie eine Sprachsynthese.

Stimme

- Öffnen Sie das Menü **Stimme**, wählen Sie eine Stimme und stellen Sie die Sprechgeschwindigkeit ein.

Aussprache

- Öffnen Sie das Menü **Aussprache**, bearbeiten Sie Ausspracheregeln und fügen Sie neue hinzu. Ausspracheregeln werden benötigt, um die Aussprache zu korrigieren, sollte die gewählte Synthese ein bestimmtes Wort nicht korrekt aussprechen können.


Wort zum Aussprachlexikon hinzufügen

- Öffnen Sie das Menü **Sprachausgabe > Sprachsynthese > Aussprache**.

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ** auf dem Tablet

- Tippen Sie auf die Taste **Neu**

- Geben Sie im Feld **Wort** das Wort in der korrekten Schreibweise ein.
- Geben Sie im Feld **Aussprache** das Wort in einer phonetischen Schreibweise ein.
- Drücken Sie die Taste **Test**, um die Aussprache zu prüfen.
- Korrigieren Sie die Eingabe im Feld **Aussprache** gegebenenfalls.
- Drücken Sie OK, wenn Sie mit der Aussprache zufrieden sind.
- Das Wort wird im Aussprachelexikon gespeichert.

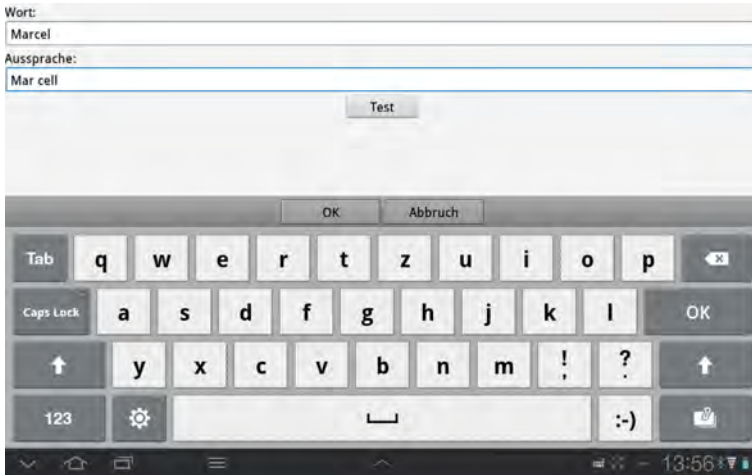

Pause zwischen Wörtern

- Wenn gewünscht, können Sie festlegen, dass die Sprachausgabe nach jedem Wort eine Pause einfügt. Wählen Sie die Länge der Pause zwischen 0,0 und 3,0 Sekunden.



Weitere Optionen des Menüs Sprachausgabe:



Zeichen sprechen

- Wenn aktiviert, wird jedes Zeichen (Buchstabe, Zahl) während der Eingabe gesprochen.


Wort sprechen

- Wenn aktiviert, wird jedes komplette Wort nach der Eingabe gesprochen. Ein Wort gilt als abgeschlossen, wenn ein Leer- oder ein Satzzeichen (.,:;!?) eingegeben wird.

Satz sprechen

- Wenn aktiviert, wird jeder komplette Satz nach der Eingabe gesprochen. Ein Satz gilt als abgeschlossen, wenn ein Satzendezeichen (.!?) eingegeben wird.

Textfenster automatisch löschen

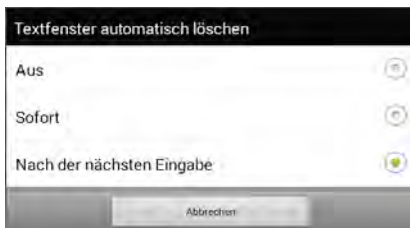

- Aus: das Textfenster wird nicht automatisch gelöscht.
- Sofort: das Textfenster wird automatisch gelöscht, nachdem man darauf getippt und somit den ganzen Text im Textfenster zusammenhängend ausgegeben hat.
- Nach der nächsten Eingabe: das Textfenster wird automatisch gelöscht, nachdem man darauf getippt und somit den ganzen Text im Textfenster zusammenhängend ausgegeben hat. Das Löschen erfolgt mit der Eingabe der nächsten Mitteilung.

Sprachausgabe aus

- Wenn der Haken gesetzt ist, ist die Sprachausgabe deaktiviert.

Zweites Textfenster

- Die Option „Zweites Textfenster“ ermöglicht es Ihnen, 2 Konversationen gleichzeitig zu führen. Sie können sich mit einer Person in Textfenster 1 unterhalten und mit einer anderen Person in Textfenster 2. Tippen Sie auf die Anzeige des aktuellen Textfensters, um das Textfenster zu wechseln:



Textfenster 1 ist aktiv. Tippen zum Wechseln auf Textfenster 2.



Textfenster 2 ist aktiv. Tippen zum Wechseln auf Textfenster 1.



Textbausteine


Textbausteine sind Wörter oder Sätze, die durch eine Abkürzung repräsentiert sind. Wird die Abkürzung und danach ein Punkt eingegeben, ersetzt der NovaChat sie mit dem zugehörigen Text.

- Wählen Sie **Einstellungen – Textbausteine**.
- Die Liste der Textbausteine wird angezeigt.



Einen Textbaustein hinzufügen

- Öffnen Sie das Menü **Textbausteine**.
- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ** .
- Drücken Sie die Taste **Neu** .
- Geben Sie im Feld **Textbaustein:** die Abkürzung ein. Wichtig: Speichern Sie den Textbaustein ohne Punkt am Ende
- Geben Sie im Feld **Erweitern zu:** den gesamten Text ein.
- Drücken Sie **OK**.

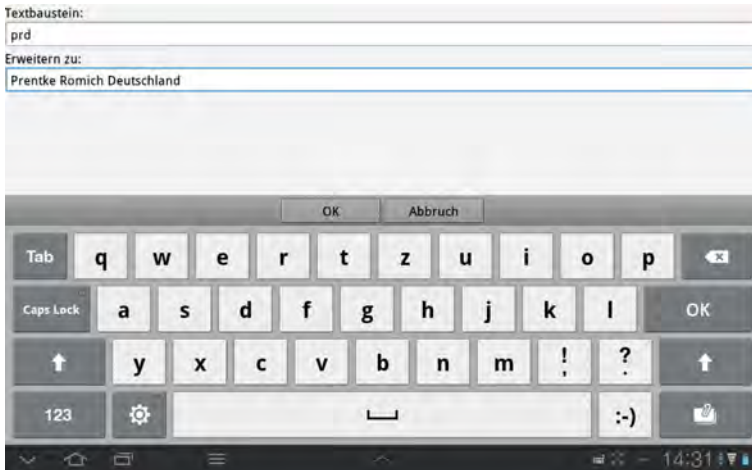

Textbaustein:

prd

Erweitern zu:

Prentke Romich Deutschland

OK Abbruch

Tab q w e r t z u i o p ↵

Caps Lock a s d f g h j k l OK

↑ y x c v b n m ! ? ↑

123 ⚙️ [] :-)

14:31


Einen Textbaustein bearbeiten

- Öffnen Sie das Menü **Textbausteine**.
- Die Liste der Textbausteine wird angezeigt.



- Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Textbaustein.
- Wählen Sie **Bearbeiten** aus dem Menü.
- Bearbeiten Sie den Textbaustein.
- Drücken Sie **OK**, um Ihre Änderungen zu speichern.


Hinweis: Sie können nur selbst hinzugefügte Textbausteine bearbeiten und löschen.

Mitgelieferte Textbausteine erkennen Sie am Symbol  links neben dem Textbaustein.


Einen Textbaustein löschen

- Öffnen Sie das Menü **Textbausteine**.
- Die Liste der Textbausteine wird angezeigt.



- Tippen Sie auf den zu löschenden Textbaustein.
 - Wählen Sie **Löschen** aus dem Menü.
 - Bestätigen Sie die Löschabfrage.
-
- **Hinweis:** Sie können nur selbst hinzugefügte Textbausteine bearbeiten und löschen. Mitgelieferte Textbausteine erkennen Sie am Symbol  links neben dem Textbaustein.

Schreibhilfen

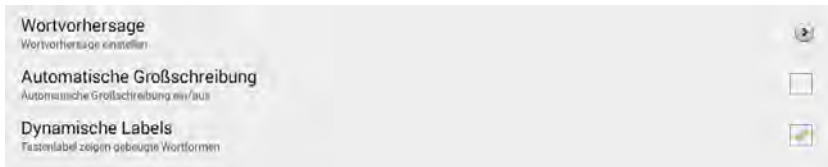

Zur Beschleunigung der Schreibgeschwindigkeit können Sie die Wortvorhersage aktivieren und einstellen.

Der NovaChat kann jedes Wort am Anfang eines Satzes automatisch großschreiben. Nutzen Sie ein Wortschatzprogramm mit integrierter Grammatik, so schalten Sie die dynamischen Labels ein. Chat zeigt dann auf den Tasten die gebeugte Form als Label an.

Wortvorhersage

Der NovaChat verfügt über eine Wortvorhersage, bestehend aus Wortvervollständigung und Vorhersage des nächsten Wortes.

Die Wortvorhersage ist lernfähig, d.h. sie kann an Ihr Vokabular angepasst werden.

Die Wortvorhersage lernt Wörter auf drei Arten:


- Wörter, die Sie eingetippt und nach Überprüfung zum Lexikon hinzugefügt haben.
- Wörter, die Sie manuell zum Lexikon hinzugefügt haben
- Wörter, die Sie aus Dateien importiert und zum Lexikon hinzugefügt haben.

- Öffnen Sie das Menü **Schreibhilfen**.
- Wählen Sie **Wortvorhersage**.



Art der Wortvorhersage wählen

Wählen Sie die Art der Wortvorhersage.

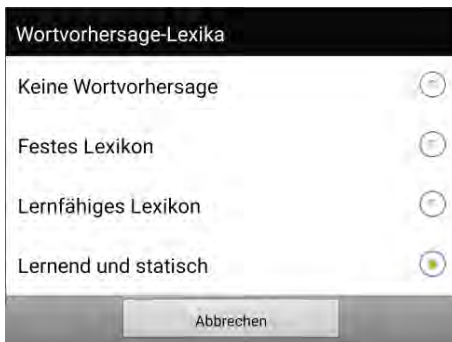

- **Keine Wortvorhersage:** Es wird kein Lexikon verwendet.
- **Festes Lexikon:** Es wird das mitgelieferte Lexikon verwendet, Wörter können weder gelernt noch importiert werden.
- **Lernfähiges Lexikon:** Das mitgelieferte Lexikon wird nicht verwendet, Sie können aber Wörter lernen und importieren.
- **Lernend und statisch:** Es wird das mitgelieferte Lexikon verwendet, zusätzlich können Wörter gelernt und importiert werden.

Lexikon wählen

Wählen Sie die Sprache des Lexikons aus.



Die folgenden Optionen stehen nur zur Verfügung, wenn bei Wortvorhersage das lernfähige Lexikon gewählt wurde.

Wort hinzufügen

Fügen Sie Wörter manuell zum Vorhersagelexikon hinzu.

Wort hinzufügen

Hinzufüg

· Tippen Sie das gewünschte Wort ein.

· Tippen Sie auf "Hinzufügen".

Wort hinzufügen

Marzipan

Hinzufüg

· Das Wort wird mit der Häufigkeit 1 hinzugefügt.

Wort hinzufügen

marzipan: 1

Hinzufüg

Überprüfung erforderlich

- Setzen Sie hier einen Haken, wenn Sie wollen, dass gelernte (von Ihnen geschriebene Wörter) vor der Aufnahme ins Lexikon kontrolliert werden können.

Überprüfung erforderlich

Gesammelte Wörter überprüfen vor Aufnahme ins Lexikon

- Wenn Sie den Haken entfernen und es gibt zur Überprüfung gesammelte Wörter, werden Sie gefragt, ob Sie alle gesammelten Wörter hinzufügen wollen.

Alle gesammelten Wörter hinzufügen?

Ja

Nein

Wörter überprüfen

Haben Sie die Option „Überprüfung erforderlich“ aktiviert, werden die von Ihnen eingetippten Wörter zunächst gesammelt. Im Menü „Wörter überprüfen“ haben Sie die Möglichkeit, die gesammelten Wörter vor Aufnahme ins Lexikon zu überprüfen. Hinter jedem geschriebenen Wort sehen Sie, wie oft das Wort eingetippt wurde.



Vorhersage-Wörter überprüfen

bundeskanzler: 1

schlagenfall: 2

☐ Nach Häufigkeit sortieren

✓ ✗ ✓ ✗


- Tippen Sie auf , um das Wort zum Lexikon hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf , um das Wort zu löschen.
- Tippen Sie auf ☐ Nach Häufigkeit sortieren, um die Wörter nach Häufigkeit zu sortieren.

Gesperrte Wörter

Sie können Wörter von der Wortvorhersage ausschließen. Gesperrte Wörter werden niemals vorgeschlagen, auch wenn Sie sie im Standardlexikon enthalten sind, einge-
tippt oder aus einer Wortliste importiert wurden.

Wort zur Sperrliste hinzufügen


- Öffnen Sie Option “Gesperrte Wörter”.
- Tippen Sie das gewünschte Wort ein.

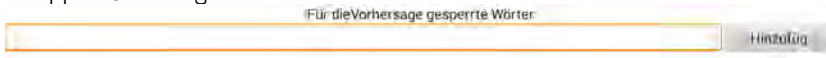

- Tippen Sie auf “Hinzufügen”.
- Das Wort wird hinzugefügt.

Wort aus der Sperrliste löschen





- Öffnen Sie Option “Gesperrte Wörter”.
- Tippen Sie auf  neben einem Wort, um das Wort zu löschen.

Wörter importieren


Sie können Dateien mit Wortlisten importieren. Die Wörter werden dem Wortvorher-
sagelexikon hinzugefügt.

Wichtig: die Datei muss als reiner Text in der Kodierung ANSI, UTF-8, UTF-16 oder
ISO-8859 mit der Erweiterung .TXT abgespeichert werden. Wenn Sie Microsoft
Word verwenden, wählen Sie **Speichern unter – Andere Formate – Dateityp: Nur
Text (*.txt) – Speichern:**

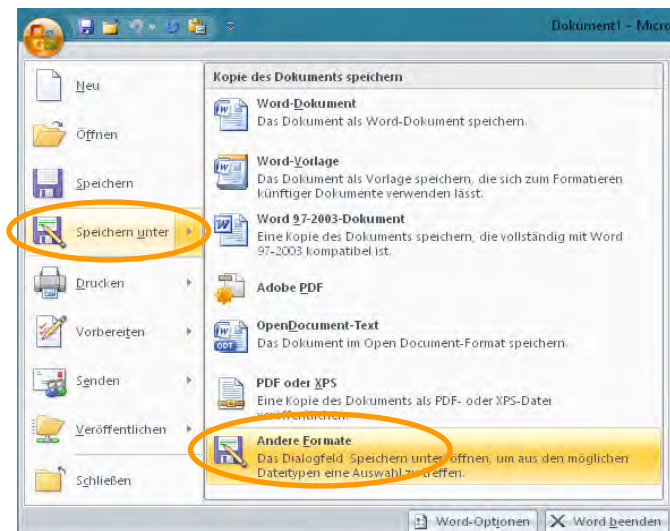

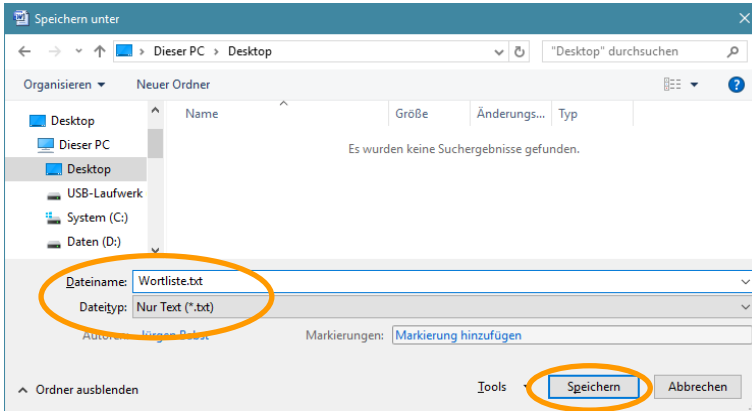


Übernehmen Sie die vorgeschlagene Textcodierung „Windows“ (Standard):

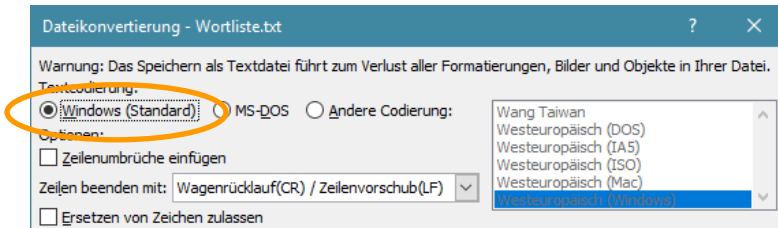


Alternativ können Sie den Windows-Texteditor „Notepad“ benutzen. Dieser speichert die Wortliste automatisch im korrekten Format.

Wortliste importieren

- Schließen Sie den NovaChat bzw. ChatFusion mit dem USB-Sync-Kabel an den PC an.
- Kopieren Sie die Datei mit den zu importierenden Wörtern in den Ordner **\Tablet\ChatPC\prediction\import** auf dem NovaChat / ChatFusion.
- Entfernen Sie das USB-Sync-Kabel vom PC.
- Öffnen Sie das Menü **Einstellungen > Schreibhilfen > Wortvorhersage > Wörter importieren**.
- Vorhandene Textdateien werden angezeigt.

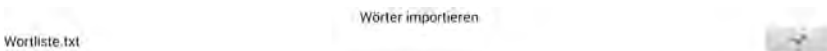

- Tippen Sie auf  neben der Liste, die Sie importieren wollen.
- Die Wörter werden importiert, die Datei verschwindet aus der Auswahl.
- Die Wörter erscheinen sofort bei den gelernten Wörtern.

Gelernte Wörter löschen

Die Wortvorhersage lernt Wörter auf drei Arten:

- Wörter, die Sie eingetippt und nach Überprüfung hinzugefügt haben.

- Wörter, die Sie manuell zur Wortvorhersage hinzugefügt haben
- Wörter, die Sie importiert haben.



Sie können die Liste der gelernten Wörter einsehen und bearbeiten. Gelernte Wörter können gelöscht oder gesperrt werden.

- Öffnen Sie das Menü **Einstellungen > Schreibhilfen > Wortvorhersage > Gelernte Wörter löschen**.

Wörter einzeln löschen oder sperren


- Wählen Sie **Einzelne Wörter löschen**.
- Die Zahl hinter jedem Wort gibt an, wie oft das Wort in der Wortvorhersage bisher abgerufen wurde.



- Tippen Sie auf , um das Wort zu löschen.
- Tippen Sie auf , um das Wort zur Liste der gesperrten Wörter hinzuzufügen.
- Setzen Sie den Haken bei ☐ Nach Häufigkeit sortieren, um die Wörter nach Häufigkeit zu sortieren.

Alle Wörter löschen

- Wählen Sie **Alle Wörter löschen**.

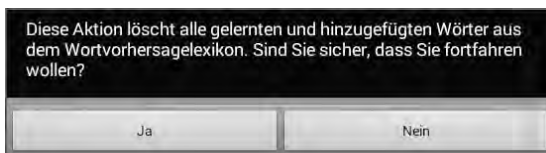


- Bestätigen Sie die Löschabfrage.
- Alle gelernten Wörter werden gelöscht, das Wortvorhersagelexikon entspricht wieder dem bei Auslieferung.


Wortvorschlagsfelder definieren

Um die Wortvorhersage in einem Vokabular nutzen zu können, müssen Sie eines oder mehrere Felder einer Seite mit der Funktion **Wortvorhersage** belegen (siehe S. 98 zum Gestalten von Tasten).

Geben Sie an, welchen Vorschlag Sie auf dem Feld angezeigt haben möchten. Zur Auswahl steht die Reihenfolge 1 bis 10.

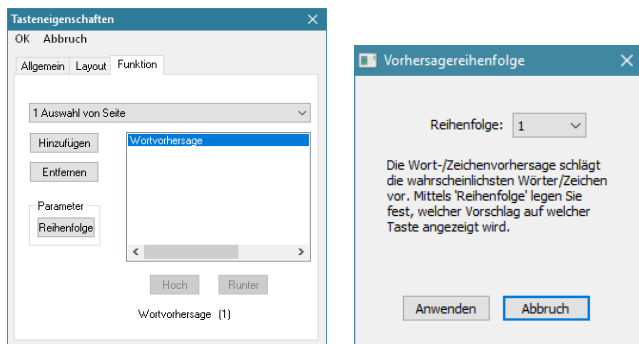

Wenn Sie beispielsweise 6 Vorschlagsfelder einrichten wollen, sollten diese die Reihenfolge 1 - 6 erhalten, d.h. die 6 besten Vorschläge anzeigen. So stellen Sie sicher, dass jedes Vorschlagsfeld ein anderes Wort aus dem Lexikon anzeigt. Machen Sie Ihre Wortvorschlagsfelder ggf. breiter als die übrigen Felder der Seite, damit lange Wörter besser angezeigt werden (siehe S. 114 zum Ändern der Größe einer Taste). Über *Taste bearbeiten* – *Layout* – *Schrift* wählen Sie Schriftart und -größe für die Wortvorschläge.

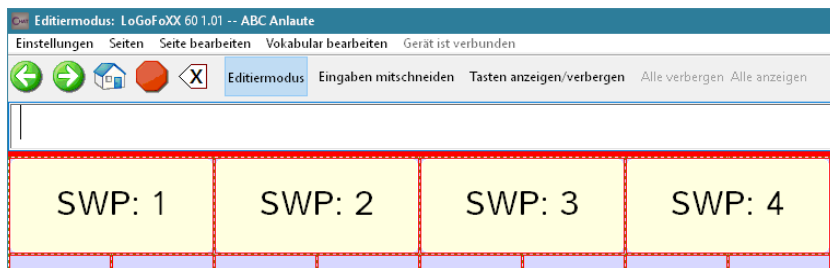

In diesem Beispiel wurden jeweils 2 Felder horizontal zusammengelegt für ein Wortvorschlagsfeld. Den 4 Wortvorschlagsfeldern wurden die Reihenfolgen 1...4 zugewiesen.

Hinweis: Wort- und Zeichenvorschlagsfeldern zugewiesene Bilder oder Label werden nicht angezeigt!

Automatische Großschreibung

- Setzen Sie den Haken, damit der NovaChat jeden neuen Satz automatisch mit einem Großbuchstaben beginnt.


Dynamische Labels

- Setzen Sie den Haken, damit der NovaChat nach der Funktion „Nächstes Wort abwandeln“ die gebeugte Wortform als Label auf der Taste anzeigt (siehe S. 142).

Mitteilung einblenden

Dies ist eine Hilfsfunktion zur Förderung des Schriftspracherwerbs. Nach dem Abrufen einer Mitteilung erscheint diese zunächst aus der zuletzt betätigten Taste heraus in Form eines größer werdenden Fensters.

- Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.
- Wählen Sie **Ansteuerung**
- Wählen Sie **Mitteilung einblenden**

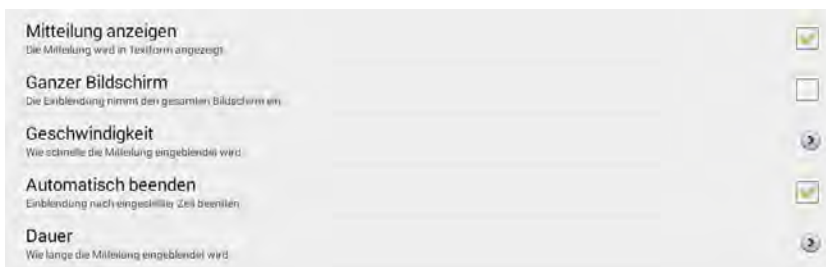


Mitteilung anzeigen:

Wenn aktiviert, erscheint die abgerufenene Mitteilung in einem animierten Fenster über der aktuellen Seite.

Ganzer Bildschirm:

- Wenn aktiviert, wächst das Fenster bis zur vollen Displaygröße an.

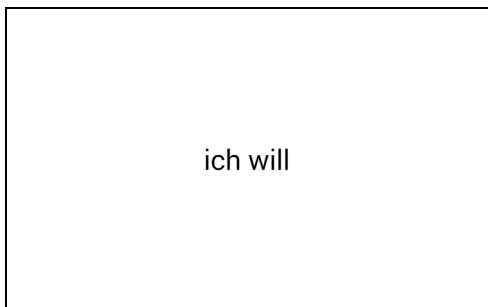

Ist die Funktion nicht ausgewählt, wächst das Fenster nur bis zu seiner Standardgröße.




Geschwindigkeit:

- Legen Sie fest, wie schnell das Fenster größer wird.

Automatisch beenden:

- Wenn aktiviert, verschwindet das Fenster mit der Mitteilung automatisch nach der gewählten Zeit. Ist die Option nicht gewählt, muss der Bildschirm berührt werden, um die Einblendung wieder zu entfernen.


Dauer:

- Haben Sie „Automatisch beenden“ gewählt, können Sie hier einstellen, wie lange die Mitteilung eingeblendet wird.
- Verlassen Sie ein Menü durch mehrmaliges Tippen auf zurück .

Layout

Hier können Sie das Erscheinungsbild des Textfensters ändern, wählen, ob Bilder flächendeckend auf Tasten angezeigt werden, die Größe des Seitenindikators einstellen sowie die Tastenoption *Farbverlauf* einstellen.

- Wählen Sie **Einstellungen – Layout**

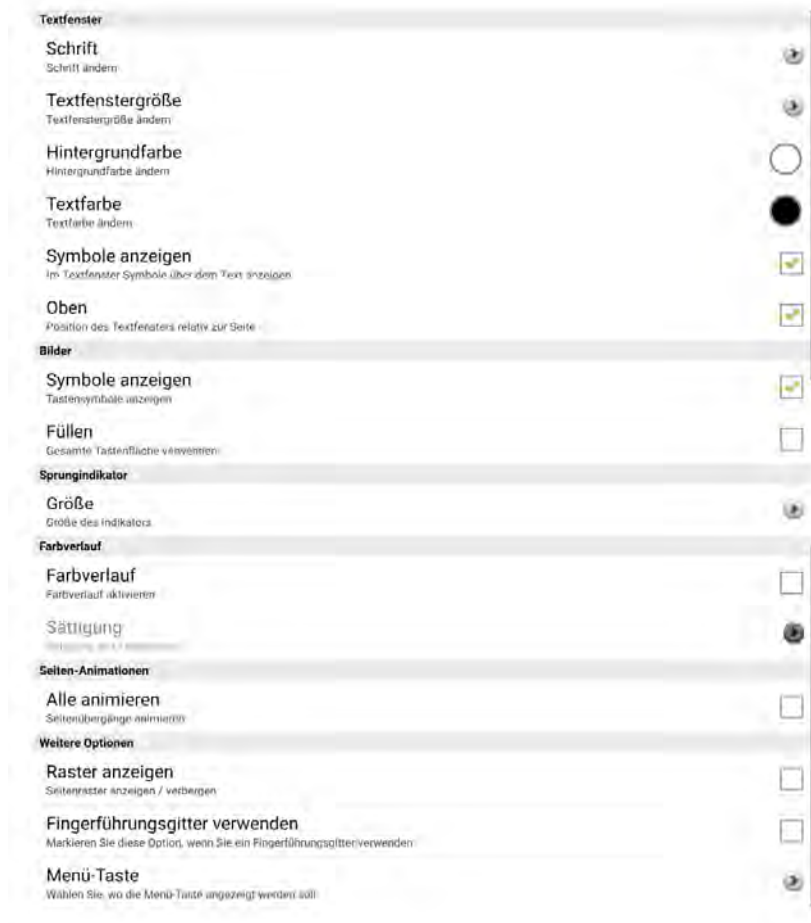

Textfenster

Schrift

- Wählen Sie die zur Anzeige von Text im Textfenster verwendete **Schrift**.
- Wählen Sie **Schrift** und wählen Sie unter den angebotenen Schriftarten.
- Wählen Sie **Schriftgröße** und stellen Sie die Schriftgröße ein. Mögliche Werte sind 8 Pt bis 72 Pt.

- Setzen Sie den Haken bei **fett**, um das Attribut fett auf die Schrift anzuwenden.
- Setzen Sie den Haken bei **kursiv**, um das Attribut kursiv auf die Schrift anzuwenden.

Textfenstergröße

- Wählen Sie die **Textfenstergröße**
 - Mögliche Werte sind **ausgeblendet**, **1 Zeile**, **2 Zeilen**, **3 Zeilen** und **4 Zeilen**.

Hintergrundfarbe

- Wählen Sie die **Hintergrundfarbe** des Textfensters.

Textfarbe

- Wählen Sie die **Textfarbe**.

Symbole anzeigen

- Wählen Sie **Symbole anzeigen**. Abgerufene Symbole werden dann oberhalb der zugehörigen Mitteilung im Textfenster angezeigt:



Oben

- Entfernen Sie den Haken bei **oben**, um das Textfenster unten auf dem NovaChat angezeigt zu bekommen.

Hinweis: Die Schriftgröße und das Anzeigen von Symbolen beeinflussen die Höhe des Textfensters.

Bilder

Symbole anzeigen

- Setzen Sie den Haken bei **Symbole anzeigen**, damit Symbole/Bilder auf den Tasten angezeigt werden. Ist diese Funktion deaktiviert, werden lediglich Tastenlabel angezeigt.

Füllen

- Setzen Sie den Haken bei **Füllen**, damit Symbole/Bilder auf den Tasten die gesamte Tastenfläche nutzen (Abb. linke Taste) und nicht nur den Platz über/unter dem Tastenlabel (Abb. rechte Taste).



Achtung: es kann sein, dass Teile des Tastenlabels nicht mehr lesbar sind, wenn das Symbol die gesamte Taste einnimmt!

Sprungindikator

Der Sprungindikator zeigt an, dass eine Taste einen Sprungbefehl zu einer anderen Seite enthält.

Größe

Sie können die Größe des Indikators einstellen.

- Mögliche Werte sind **Ausblenden**, **Kleinste**, **Klein**, **Mittel**, **Groß** und **Größte**.



Farbverlauf

Farbverlauf

- Setzen Sie den Haken bei **Farbverlauf**, damit die Tasten einen 3D-Effekt erhalten. Die Hintergrundfarbe der Tasten wird dabei dynamisch nach unten abgedunkelt.

Sättigung

- Wählen Sie die **Sättigung des Farbverlaufs**.
 - Mögliche Werte sind **20%** (starke Kontraste) bis **80 %** (geringe Kontraste).



20% Farbverlauf

40% Farbverlauf

80% Farbverlauf

Seiten-Animationen


Alle animieren

- Wenn Sie den Haken bei **Alle animieren** setzen, werden neue Seiten beim Anzeigen von rechts in das Display hinein- und beim Verlassen wieder nach rechts hinausgeschoben. Dies kann den Benutzern das Verstehen des Seiten-Konzepts erleichtern.

Weitere Optionen

Raster anzeigen

- Setzen Sie den Haken bei **Raster anzeigen**, um ein schwarzes Linienraster um die Tastenfelder herum angezeigt zu bekommen.

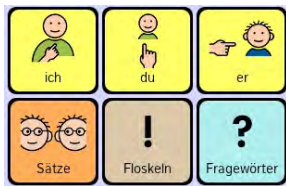

Anzeige ohne Raster



Anzeige mit Raster



Fingerführungsgitter verwenden


- Wenn Sie ein Fingerführungsgitter verwenden, setzen Sie den Haken bei **Fingerführungsgitter verwenden**. Seiten werden dann so dargestellt, dass alle Inhalte mit Fingerführungsgitter sichtbar und zugänglich sind.

Menü-Taste


Wählen Sie, wie Sie das Hauptmenü öffnen wollen.



- **Ausgeblendet:** Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Hauptmenü zu öffnen.

- **Textfenster:** Tippen Sie auf der links im Textfenster angezeigten Taste , um das Hauptmenü zu öffnen.



- **Menü-Leiste:** Tippen Sie auf der links oben in der Menüleiste angezeigten Taste , um das Hauptmenü zu öffnen.



Wortsuche


Wählen Sie, ob die Option „Wortsuche“ im Hauptmenü angezeigt wird, und stellen Sie das Anzeigintervall für gefundene Einträge ein.

- Wählen Sie **Einstellungen – Wortsuche**




Im Menü anzeigen

- Setzen Sie den Haken, um die Wortsuche im Hauptmenü angezeigt zu bekommen.

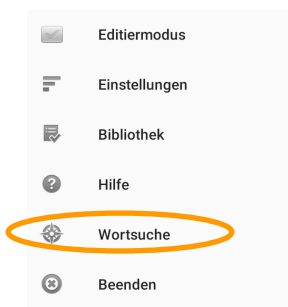

Anzeige-Intervall

Legen Sie fest, wie lange jeder gefundene Eintrag oben rechts im Textfenster angezeigt wird. Mögliche Werte sind 1,0 - 30,0 Sekunden.

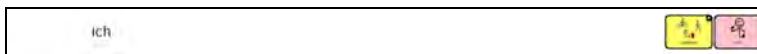


Hinweis: vergrößern Sie das Textfenster, um größere Symbole angezeigt zu bekommen.

Menüsperre


Sie können alle Menüs sperren, so dass der Benutzer des NovaChat-Geräts keine Änderungen an den Einstellungen sowie am Vokabular durchführen kann.

- Wählen Sie **Einstellungen – Menüsperre**.

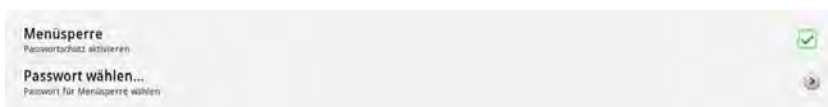

Menüsperre

- Setzen Sie den Haken bei Menüsperre.
- Das Fenster zur Eingabe eines Passwortes öffnet sich.

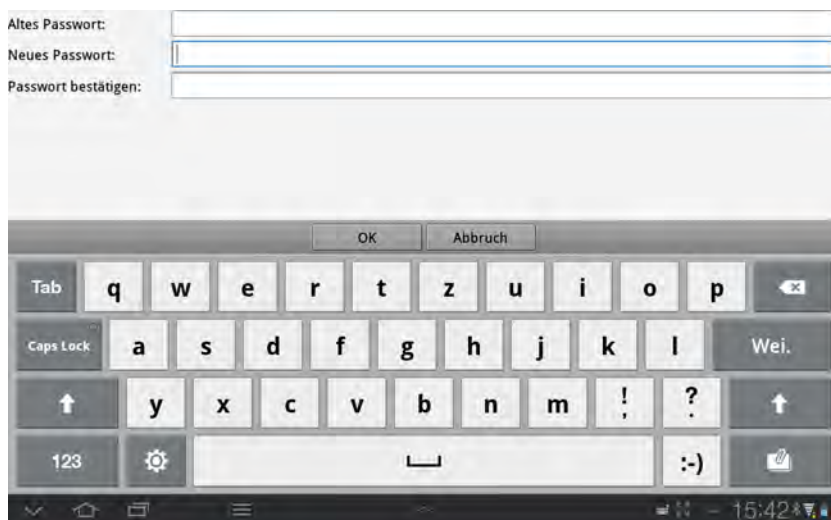


Passwort wählen

- Geben Sie im Feld **Neues Passwort** ein Passwort ein.
- Wiederholen Sie die Eingabe im Feld **Passwort bestätigen**.
- Tippen Sie auf **OK**.


Menüsperre einschalten

Die Option „Menüsperre“ muss in den Einstellungen aktiviert sein, damit sie genutzt werden kann (siehe Seite 211).

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.

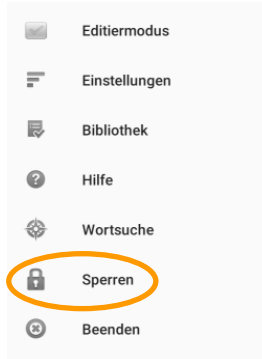


- Wählen Sie die Option **Sperren**
- Wählen Sie, ob der KIOSK-Modus ebenfalls aktiviert werden soll. Der KIOSK-Modus verhindert das Beenden / Verlassen der Chat-Anwendung.

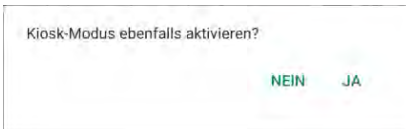

- Das Menü ist gesperrt.

Menüsperre ausschalten

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.

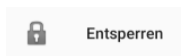

- Wählen Sie die Option **Entsperren**
- Geben Sie das Passwort ein.

Falls Sie das Passwort vergessen haben, geben Sie BOSCO ein!

Passwort für Menüsperre ändern

- Wählen Sie **Einstellungen > Menüsperre**.
- Wählen Sie **Passwort wählen...**
- Das Fenster zur Eingabe eines Passwortes öffnet sich.

Altes Passwort:

Neues Passwort:

Passwort bestätigen:

OK Abbruch

Tab q w e r t z u i o p

Caps Lock a s d f g h j k l Wei.

y x c v b n m ! ?

123

15:42

- Geben Sie im Feld **Altes Passwort** das alte Passwort ein.
- Geben Sie im Feld **Neues Passwort** das neue Passwort ein.
- Wiederholen Sie die Eingabe des neuen Passwortes im Feld **Passwort bestätigen**.
- Tippen Sie auf **OK**.

Profile


Ein Profil enthält die gewählte Sprache sowie alle ansteuerungsspezifischen Parameter eines Benutzers. Über *Einstellungen - Profile* können Sie Profile verwalten.

Neues Profil erstellen



Speichern Sie die aktuellen Einstellungen in einem Profil.

Chat-Editor

- Öffnen Sie das Menü *Einstellungen – Profile*.

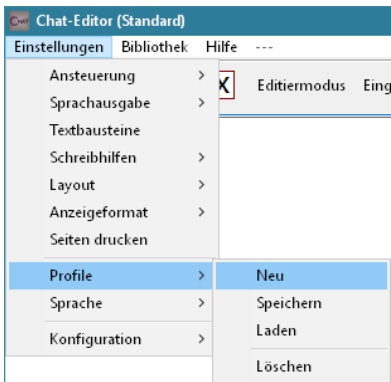

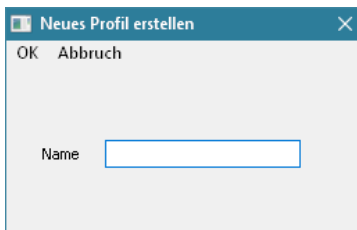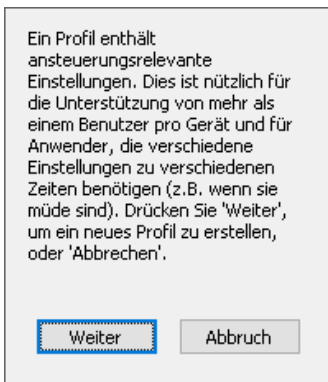


- Wählen Sie **Neu**. Ein Hinweis erscheint. Wählen Sie **Weiter**.




- Geben Sie einen Namen für das Profil ein.
- Wählen Sie **OK**.
- Das Profil wurde erstellt.

NovaChat-Gerät


- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.

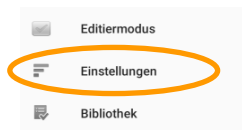

- Wählen Sie **Profile**
- Wählen Sie **Neu...**

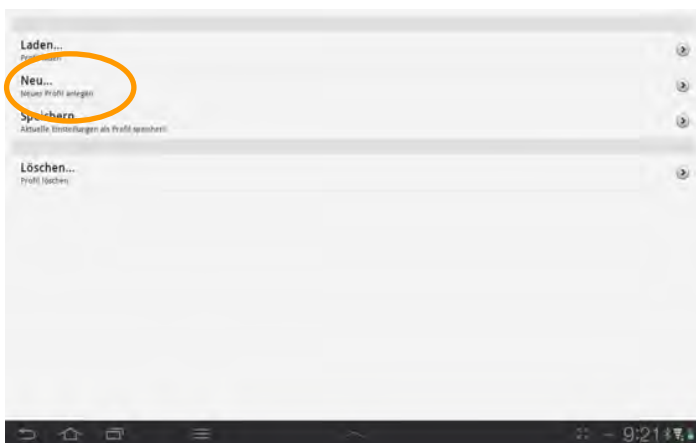

- Geben Sie einen Namen für das Profil ein.

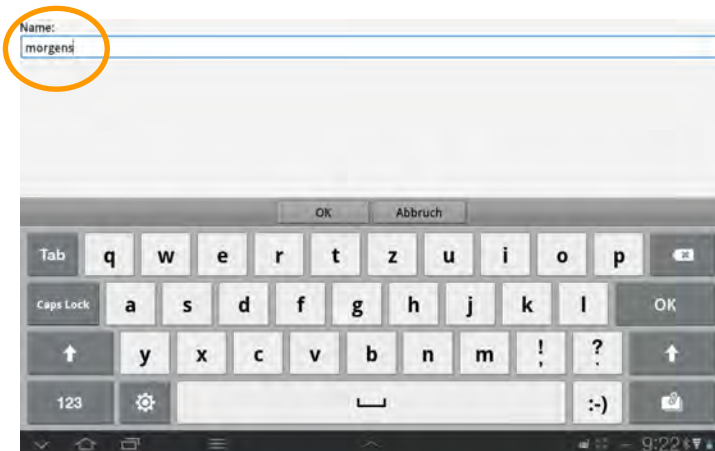


- Wählen Sie **OK**.
- Das Profil wurde erstellt.

Profil speichern

Überschreiben Sie ein bereits angelegtes Profil mit den aktuellen Einstellungen.



Chat-Editor

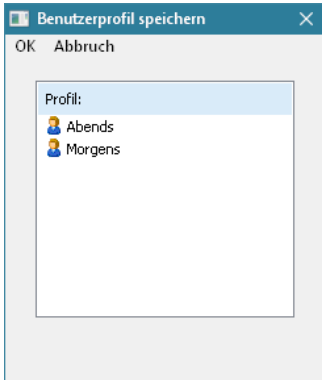
- Öffnen Sie das Menü **Einstellungen – Profile**.
- Wählen Sie **Speichern**.
- Wählen Sie das Profil aus, das Sie überschreiben wollen.




- Wählen Sie **OK**.

NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.

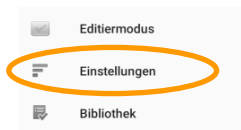

- Wählen Sie **Profile**
- Wählen Sie **Speichern...**

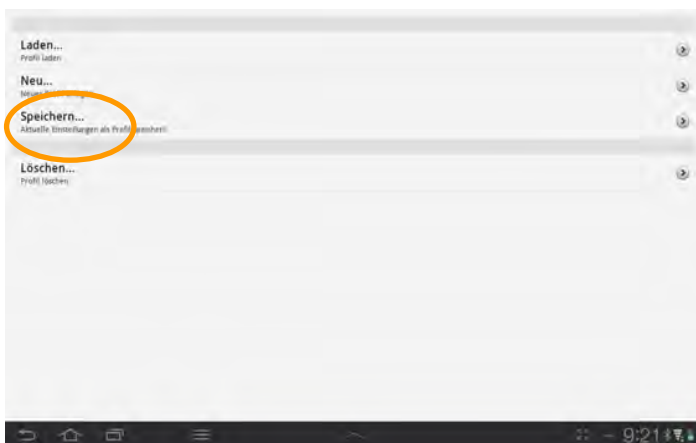

- Wählen Sie das Profil aus, das Sie überschreiben wollen.




Profil laden

Laden Sie ein Profil, um die darin gespeicherten Einstellungen zu verwenden.



Chat-Editor

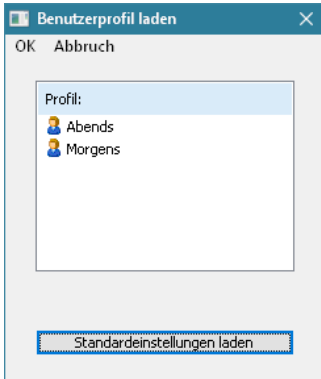
- Öffnen Sie das Menü **Einstellungen – Profile**.
- Wählen Sie **Laden**.
- Wählen Sie das Profil aus, das Sie laden wollen.




- Wählen Sie **OK**.

NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.

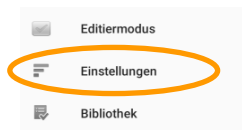

- Wählen Sie **Profile**
- Wählen Sie **Laden...**

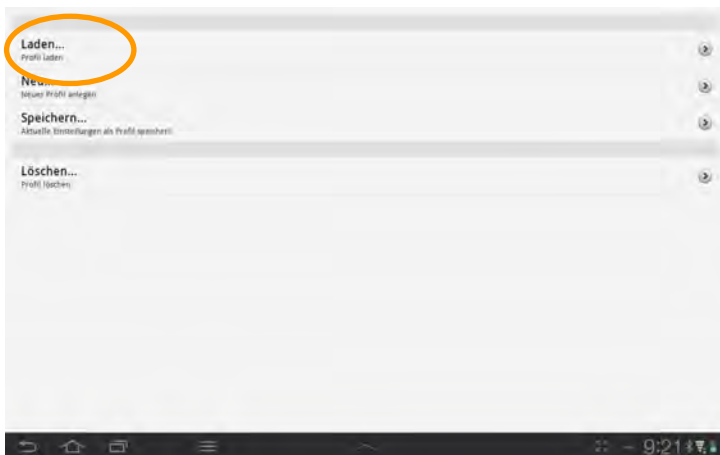

- Wählen Sie das Profil aus, das Sie laden wollen.




Tipp: Sie können die Funktion *Profil laden* über die Tastenfunktion „Profil laden“ direkt einer Taste des Vokabulars zuweisen (siehe S. 98). So kann der Benutzer selbständig zwischen Profilen wechseln, ohne den Wechsel der Einstellungen manuell vornehmen zu müssen.

Standardprofil laden



Chat-Editor

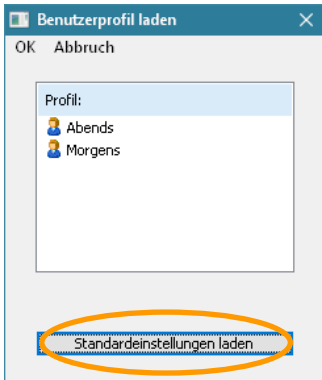
- Öffnen Sie das Menü **Einstellungen – Profile**.
- Wählen Sie **Laden**.




- Wählen Sie **Standardeinstellungen laden**.

NovaChat-Gerät


- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.

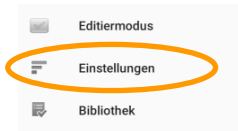

- Wählen Sie **Profile**
- Wählen Sie **Laden...**

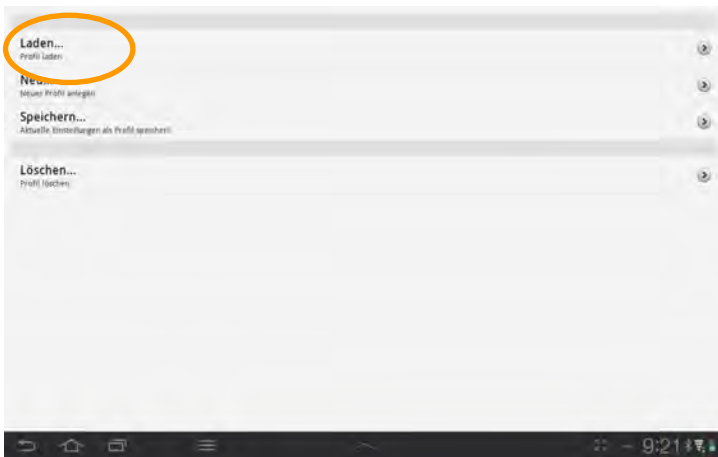


- Wählen Sie **Standardeinstellungen laden**.

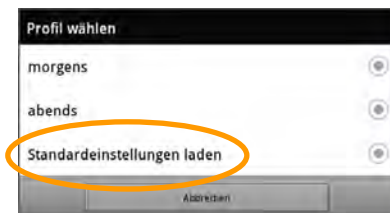

Profil löschen



Chat-Editor

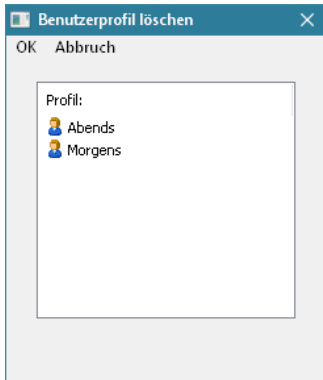
- Öffnen Sie das Menü **Einstellungen – Profile**.
- Wählen Sie **Löschen**.



- Wählen Sie das zu löschende Profil.
- Wählen Sie **OK**.
- Das Profil wurde gelöscht.

NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.

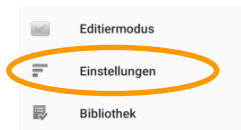

- Wählen Sie **Profile**
- Wählen Sie **Löschen...**



- Wählen Sie das zu löschende Profil.



- Das Profil wurde gelöscht.

Sprache


Das Menü Sprache schaltet die Sprache der Benutzeroberfläche sowie die der Wortvorhersage um. Die Sprachsynthese lädt eine zur gewählten Sprache passende Stimme.

Die Anzahl der angebotenen Sprachen ist abhängig von der Konfiguration des NovaChat-Geräts. Standardmäßig sind Deutsch und Englisch vorhanden.


Sprache wechseln

Chat-Editor

- Öffnen Sie das Menü **Einstellungen - Sprache**.

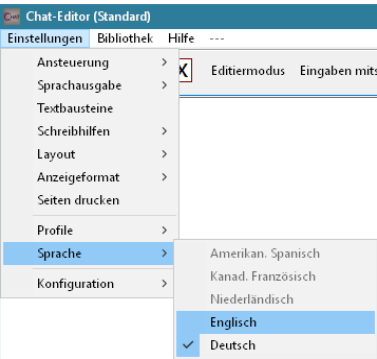

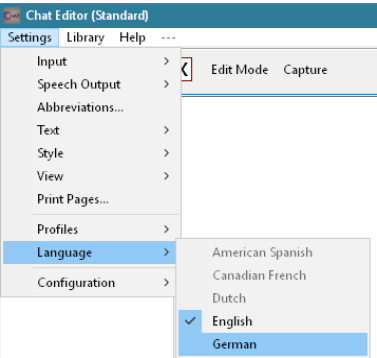


- Wählen Sie die Sprache aus.
- Die Menüs des Editors erscheinen in der gewählten Sprache (hier: Englisch):



- Öffnen Sie das Menü **Settings - Language** und wählen Sie **German** aus, um die Menüs wieder in Deutsch zu sehen.

NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.

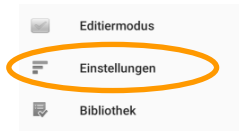

- Wählen Sie **Sprache**.
- Wählen Sie die Sprache aus.





- Die Menüs im NovaChat-Gerät erscheinen in der gewählten Sprache (hier: Englisch):


Input	Activation timing, tap response, scanning, headpointing, gestures and tilt options	➔
Speech Output	Pronunciation, voice and more	➔
Abbreviations...	Manage abbreviations	➔
Text	Prediction, capitalization and more	➔
Style	Edit colors, fonts and layout	➔
Word Finder	Edit word finder menu item and flip interval	➔
Menu Lock	Password-protect the application settings	➔
Profiles	Manage profiles	➔
Language	Change the application language	➔
System	System settings	➔

- Öffnen Sie das Menü **Language** und wählen Sie **German** aus, um die Menüs wieder in Deutsch zu sehen.





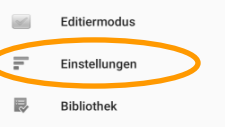


System

Das Menü System gibt es nur auf dem NovaChat-Gerät. Es ermöglicht das Einstellen gerätespezifischer Parameter.

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.




- Wählen Sie **System**.

Bluetooth / Lautsprecher & Telefon	
Rückmeldungen / Feedback	
Display / Energie	
Zeit und Datum	
Batterie- und Ladezustand	
Kiosk-Modus <small>Andere Anwendungen sperren</small>	
Anonyme Nutzungsdaten teilen <small>Zur Verbesserung der Benutzererfahrung anonyme Nutzungsdaten zu Einstellungen, Präferenzen und Fehlermeldungen sammeln und teilen</small>	<input type="checkbox"/>
Daten zurücksetzen <small>Alle Daten auf Standardwerte zurücksetzen</small>	

Bluetooth / Lautsprecher & Telefon

Dieses Menü dient zum Koppeln und Verbinden des NovaChats mit dem rückseitig verbauten Verstärker. Weiterhin können Sie den NovaChat/ChatFusion mit einer Bluetooth-Taste und einem Android-Smartphone verbinden.

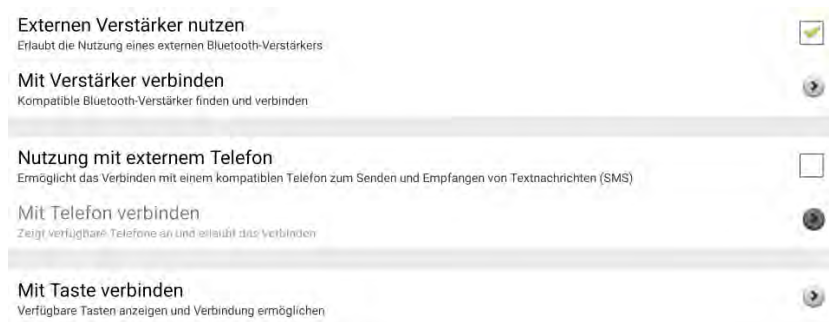

Externen Verstärker benutzen

- Entfernen Sie den Haken, wenn Sie das Tablet ohne den Verstärker nutzen wollen. Da die erreichbare Lautstärke der internen Lautsprecher stark reduziert ist gegenüber der Nutzung mit externem Verstärker, wird von dieser Option abgeraten.

Mit Verstärker verbinden

- Tippen Sie auf „Mit Verstärker verbinden“, um nach Verstärkern zu suchen.
- Es erscheint ein Eintrag „NOVA AMP“ im Display.

NOVA AMP (00:07:80:53:3D:35)

- Tippen Sie auf den Eintrag „NOVA AMP“, um Tablet und Verstärker zu verbinden.
- Das Tablet zeigt eine erfolgreiche Verbindung durch das Wort „Verbunden“ an.
- Schließen Sie das Menü wieder.

Nutzung mit externem Telefon

- Setzen Sie den Haken, wenn Sie mit dem NovaChat/ChatFusion Textnachrichten (SMS) über ein separates Smartphone senden und empfangen möchten. Auf dem Smartphone muss die App AeroText installiert sein und ausgeführt werden.

Mit Telefon verbinden

- Tippen Sie auf „Mit Telefon verbinden“, um nach Telefonen zu suchen.
- Gefundene Geräte werden angezeigt. Tippen Sie auf einen Eintrag, um das zugehörige Smartphone mit dem NovaChat/ChatFusion zu verbinden.
- Das Tablet zeigt eine erfolgreiche Verbindung durch das Wort „Verbunden“ an.

Samsung Galaxy S4 (38:0B:40:34:D0:C7) - Verbunden

- Schließen Sie das Menü wieder.

Mit Taste verbinden

- Tippen Sie auf „Mit Taste verbinden“, um nach Bluetooth-Tasten wie z.B. der AeroSwitch zu suchen.
- Gefundene Tasten werden angezeigt. Tippen Sie auf einen Eintrag, um die zugehörige Taste mit dem NovaChat/ChatFusion zu verbinden.
- Das Tablet zeigt eine erfolgreiche Verbindung durch das Wort „Verbunden“ an.

Zum Verbinden mit einer Bluetooth-Taste schlagen Sie auch im Handbuch Ihrer Bluetooth-Taste nach.

Rückmeldungen / Feedback

Hier können Sie einstellen, ob Sie akustische und taktile Rückmeldungen vom NovaChat-Gerät erhalten, wenn Sie auf andere Android-Programme zugreifen. Diese Einstellungen sind nur für Benutzer von offenen Systemen relevant.

Auslösepiepton

Rückmeldung einer Eingabe durch Piepton

☐

Vibrieren

Rückmeldung einer Eingabe durch Vibrieren

☐

Auslösepiepton

Setzen Sie den Haken, um das Auslösen in Android akustisch zurückgemeldet zu bekommen.

Vibrieren


Setzen Sie den Haken, um das Auslösen in Android durch Vibrieren des NovaChats zurückgemeldet zu bekommen.

Display / Energie

Hier können Sie die Helligkeit des Displays einstellen, wählen, ob die Helligkeit automatisch an das Umgebungslicht angepasst werden soll, sowie die Zeit einstellen, wann das Display sich automatisch abschaltet, um Energie zu sparen.

Helligkeit Bildschirmhelligkeit anpassen	➔
Bildschirm ausschalten Zeit wählen, nach der sich der Bildschirm automatisch abschaltet	➔

Helligkeit

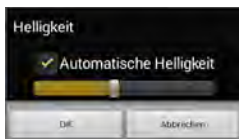

- Stellen Sie die Displaybeleuchtung mit dem Regler auf den gewünschten Wert.
- Setzen Sie den Haken **Automatische Helligkeit**, damit die Helligkeit automatisch an das Umgebungslicht angepasst wird.


Bildschirm ausschalten



- Wählen Sie, wann das Display sich automatisch abschalten soll, um Energie zu sparen.

Zeit und Datum

Hier können Sie die interne Uhr stellen sowie das Anzeigeformat von Uhrzeit und Datum wählen.

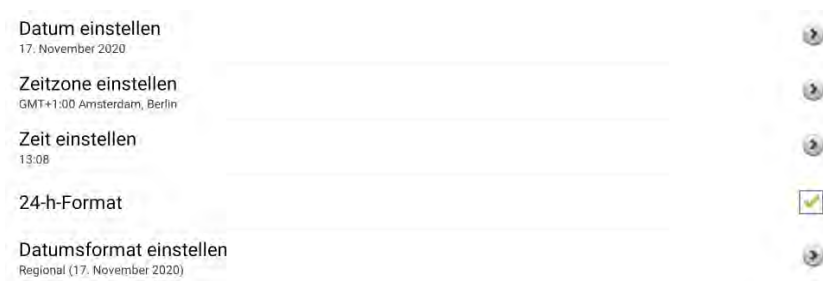

Datum einstellen

- Geben Sie das aktuelle Datum ein.

Zeitzone einstellen

- Wählen Sie die Zeitzone, in der Sie sich befinden.

Zeit einstellen


- Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.

24-h-Format

- Setzen Sie den Haken, um die Uhrzeit in dem in Deutschland üblichen 24-h-Format angezeigt zu bekommen.

Datumsformat einstellen

- Wählen Sie, in welcher Form das Datum angezeigt werden soll.

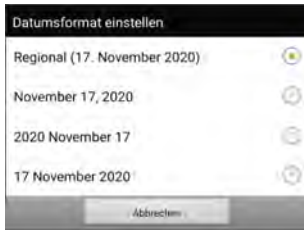

Batterie- und Ladezustand

Der Akkustand beider Akkus wird rechts im Display angezeigt, sobald bestimmte Grenzen unterschritten werden.

Tablet-Akkustand <25%:



Tablet-Akkustand <15%:



Verstärker-Akkustand <25%:



Verstärker-Akkustand <15%:



Im Menus System können Sie darüber hinaus jederzeit die Kapazität der im Tablet und im Verstärker eingebauten Akkus kontrollieren und prüfen, ob das Ladegerät korrekt arbeitet.



Kiosk-Modus

Kios-Modus

- Setzen Sie den Haken bei Kiosk-Modus, um zu verhindern, dass die Chat-Anwendung beendet oder verlassen werden kann.
- Wählen Sie, ob Sie die Menü-Taste ebenfalls sperren wollen.

Passwortschutz

- Wenn gewünscht, schützen Sie den Kiosk-Modus mit einem Passwort. Zum Beenden des Kiosk-Modus muss dann das Passwort eingegeben werden.
- Entfernen Sie den Haken bei Kiosk-Modus, um von Chat aus auf andere Android-Anwendungen zugreifen oder die Chat-Anwendung beenden zu können.

Hinweis: Ist Ihr NovaChat-Gerät als geschlossene Anlage konfiguriert, steht diese Option nicht zur Verfügung.

Falls Sie das Passwort vergessen haben, geben Sie bazinga ein!

Geräte-Lautstärketasten deaktivieren

Setzen Sie den Haken, wenn Sie an die Lautstärketasten oben auf dem NovaChat-Gerät deaktivieren wollen. Sie können Sie Lautstärke dann nur noch über entsprechend belegte Tasten (lauter, leiser, stumm) im Vokabular einstellen .


Anonyme Nutzungsdaten teilen

Setzen Sie den Haken, wenn Sie an PRC-Salttillos Programm zur Verbesserung der Benutzererfahrung teilnehmen wollen. Der NovaChat/ChatFusion sammelt dann anonyme Daten bzgl. der von Ihnen verwendeten Einstellungen, auftretende Fehlermeldungen und die Nutzung der internen Hilfe. Es werden keine personenbezogenen Daten gesammelt oder übertragen und keine Daten, die Rückschlüsse auf Sie als Benutzer erlauben würden.

Daten zurücksetzen

Diese Option löscht sämtliche benutzerrelevanten Daten (Vokabulare, Lexika, Einstellungen) vom Gerät.

- Wählen Sie diese Option, wenn der Benutzer den NovaChat nicht mehr benötigt und seine persönlichen Daten gelöscht werden sollen.
- Bestätigen Sie die Löschabfrage.

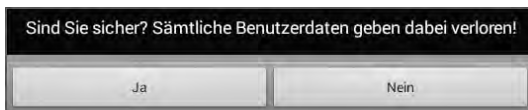


- Sämtliche Daten werden gelöscht.





Sprachdatenaufzeichnung

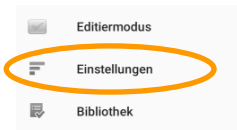Das Menü Sprachdatenaufzeichnung gibt es nur auf dem NovaChat-Gerät. Es ermöglicht das Aufzeichnen aller mit dem NovaChat generierten Mitteilungen zur Analyse mittels „RealizeLanguage“.


- Tippen bzw. tippen und halten Sie Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.



- Wählen Sie **Sprachdatenaufzeichnung**.

Sprachdatenaufzeichnung Ermöglicht das Aufzeichnen der mit dem Gerät erzeugten Aussagen	<input type="checkbox"/>
RealizeLanguage™ Aufgezeichnete Daten an RealizeLanguage™ übertragen	
Aufgezeichnete Daten in Datei speichern Die aufgezeichneten Daten werden in einer Datei auf dem NovaChat-Gerät gespeichert	
Aufgezeichnete Daten löschen Die aufgezeichneten Daten werden gelöscht	
Passwort für aufgezeichnete Daten setzen Schützen Sie Ihre privaten Daten durch Setzen eines Passwortes für die Sprachdatenaufzeichnung	

Sprachdatenaufzeichnung

- Setzen Sie den Haken, um die Aufzeichnung aller mit dem NovaChat abgerufenen Aussagen zu starten. Das Symbol  im Textfenster zeigt an, dass die Sprachdatenaufzeichnung aktiviert ist.

RealizeLanguage™

Gerät mit Konto verknüpfen

- Geben Sie einmalig E-Mail-Adresse und Passwort Ihres RealizeLanguage-Kontos ein, um den NovaChat mit Ihrem RealizeLanguage-Konto zu verknüpfen.

RealizeLanguage-E-Mail-Adresse:	<input type="text"/>
RealizeLanguage-Passwort:	<input type="password"/>
<input type="button" value="Passwort zurücksetzen"/>	

Benutzer

- Wählen Sie unter den in Ihrem RealizeLanguage-Konto vorhandenen Benutzern denjenigen aus, der den NovaChat verwendet. Legen Sie einen neuen Benutzer an, falls er noch nicht existiert.

RealizeLanguage™-Konto

j.babst@prentke-romich.de (Aktiv)



Person

NovaChat 7



Auto-Upload

Regelmäßig Sprachdaten auf Realize Language hochladen



Jetzt hochladen

Letztes Upload: 31 Mai 2016 13:41

Auto-Upload

- Setzen Sie den Haken, wenn der NovaChat gesammelte Sprachdaten regelmäßig automatisch auf das verknüpfte RealizeLanguage-Konto hochladen soll.

Jetzt hochladen

- Wählen Sie diese Option, um im NovaChat gesammelte Sprachdaten auf das verknüpfte RealizeLanguage-Konto hochzuladen.

Aufgezeichnete Daten in Datei speichern

Wählen Sie diese Option, wenn der NovaChat nicht mit Ihrem RealizeLanguage-Konto verknüpft ist oder wegen fehlender Internetverbindung keine Daten auf Ihr Konto hochladen kann.

Person

Standardperson

Seit der letzten Sicherung

Von 30 April 2016 Bis 31 Mai 2016


Alle

Als Datei
sichern

- Wählen Sie den Benutzer. Gibt es nur einen Benutzer, so steht nur der Standardbenutzer zur Verfügung.
- Wählen Sie den zu speichernden Zeitraum. Zur Wahl stehen:
 - Seit dem letzten Speichern
 - Von ... Bis
 - Alle
- Tippen Sie "Als Datei sichern", um die ausgewählten Sprachdaten in der Datei zu speichern

Aufgezeichnete Daten löschen

- Wählen Sie diese Option, um die im Gerät aufgezeichneten Sprachdaten einzelner oder aller Benutzer zu löschen.
- Wählen Sie, welchen Daten gelöscht werden sollen.

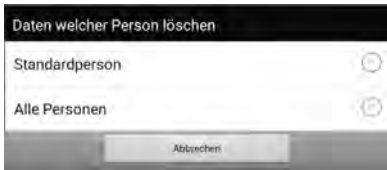

Hinweis: Es werden nur die auf den Gerät aufgezeichneten Sprachdaten gelöscht. Daten, die Sie bereits auf Ihr RealizeLanguage hochgeladen haben, sind vom Löschvorgang nicht betroffen.

Passwort für aufgezeichnete Daten setzen

Sie können die im Gerät gespeicherten Sprachdaten mit einem Passwort schützen. Ein Sichern der Sprachdaten als Datei bzw. ein Upload auf das verknüpfte RealizeLanguage-Konto ist dann nur nach Eingabe des Passwortes möglich

Passwort setzen

- Geben Sie ein Passwort im Feld „Neues Passwort“ ein.
- Wiederholen Sie die Eingabe des Passwortes im Feld „Passwort bestätigen“.
- Bestätigen Sie die Eingabe durch Tippen auf „OK“.

Passwort ändern

- Geben Sie das alte Passwort im Feld „Altes Passwort“ ein.
- Geben Sie das neue Passwort im Feld „Neues Passwort“ ein.
- Wiederholen Sie die Eingabe des neuen Passwortes im Feld „Passwort bestätigen“.
- Bestätigen Sie die Eingabe durch Tippen auf „OK“.

Altes Passwort:

Neues Passwort:

Passwort bestätigen:



SENDEN UND EMPFANGEN VON TEXT- NACHRICHTEN (SMS)

Textnachrichten (SMS) mit den NovaChat/ChatFusion versenden und empfangen

In Verbindung mit einem kompatiblen Android-Smartphone können Sie über Ihren NovaChat bzw. ChatFusion Textnachrichten (SMS) versenden und empfangen. Der Nachrichtenversand läuft dabei weiterhin komplett über das Smartphone, Nachrichten werden auf den NovaChat/ChatFusion lediglich gespiegelt.

Achtung: abhängig von Ihrem Mobilfunkvertrag kann das Versenden von Nachrichten mit zusätzlichen Kosten verbunden sein!

AeroText installieren

Zur Kommunikation mit dem NovaChat/ChatFusion müssen Sie auf Ihrem Smartphone die kostenlose Hilfs-App „AeroText“ des Herstellers PRC-Salttillo herunterladen und installieren.

- Gehen Sie mit Ihrem Smartphone auf die Seite <https://www.prc-salttillo.com/texting?lang=de>
- Setzen Sie den Haken bei „Ich stimme dem EndkundenLizenzvertrag zu“.
- Tippen Sie auf „AeroText herunterladen“.




AeroText

AeroText™ ist eine einfach zu nutzende Android-App, die es ermöglicht, mit Hilfe einer PRC-Salttillo-Kommunikationshilfe Nachrichten (SMS) zu versenden und zu empfangen sowie Ihre Kontakte zu verwalten. Dem Benutzer der Kommunikationshilfe steht zum Erstellen von Text das komplette in der Kommunikationshilfe gespeicherte Vokabular zur Verfügung.



AeroText herunterladen

☐ [Ich stimme dem Endkunden-Lizenzvertrag zu](#)

 AeroText herunterladen

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

- [PRC AeroText Kurzanleitung](#)
- [Salttillo AeroText Handbuch](#)

AeroText auf dem Smartphone installieren


1. Öffnen Sie den Internet-Browser auf Ihrem Smartphone.
2. Öffnen Sie diese URL: <https://prc-salttillo.com/texting?lang=de>. Setzen Sie den Haken bei „Ich stimme dem Endkunden-Lizenzvertrag zu“ und klicken Sie auf den Button „AeroText herunterladen“.
3. Ist der Download abgeschlossen, öffnen Sie die Android-Einstellungen Ihres Smartphones.

- Folgen Sie den auf der Seite gemachten Angaben zur Installation von AeroText auf Ihrem Android-Smartphone


AeroText konfigurieren

AeroText zur Standardnachrichten-App machen

Für die volle Funktionalität muss AeroText auf Ihrem Smartphone zur Standard-App für Nachrichten gemacht werden. Tippen Sie auf die Mitteilung

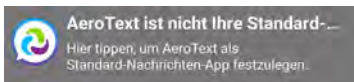


Tippen Sie im nächsten Dialog auf „JA“.

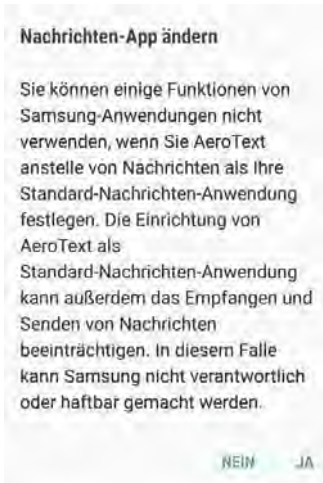


Sie können diese Einstellung jederzeit wieder rückgängig machen.

Bluetooth Berechtigungsanfrage

AeroText benötigt Bluetooth, um sich mit dem NovaChat/ChatFusion zu verbinden. Ist Bluetooth auf Ihrem Smartphone deaktiviert, erhalten sie folgende Meldung:

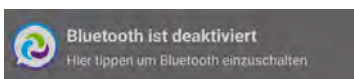

Tippen Sie auf den Hinweis „Bluetooth ist deaktiviert“, um Bluetooth auf dem Smartphone einzuschalten und die Bluetooth-Berechtigungsanfrage zu starten. Tippen Sie im nächsten Dialog auf „ZULASSEN“.

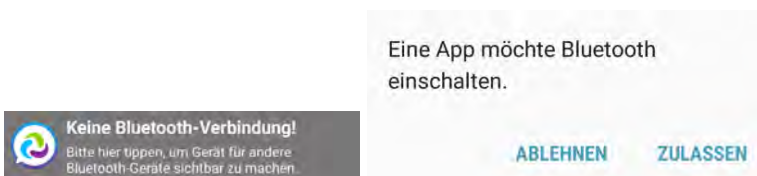

Smartphoneunterstützung auf dem NovaChat / ChatFusion aktivieren

NovaChat/ChatFusion

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wählen Sie **Einstellungen > System > Bluetooth / Lautsprecher & Telefon**
- Setzen Sie den Haken bei **Nutzung mit externem Telefon**



Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone und machen Sie das Smartphone für Bluetooth sichtbar, damit NovaChat/ChatFusion und Smartphone sich finden können (siehe auch Seite 237). Telefon und NovaChat/ChatFusion verbinden sich i.d.R. innerhalb weniger Sekunden von selbst. Sollte der NovaChat/ChatFusion Probleme haben, das Smartphone zu finden, so wählen Sie die Option „Mit Telefon verbinden“ und wählen Sie das Telefon, auf dem AeroText läuft, manuell aus.

Fehlermeldung „Konnte nicht mit dem Telefon verbinden“



Zeigt der NovaChat/ChatFusion beim Starten die Meldung, so prüfen Sie, ob das Smartphone in der Nähe und eingeschaltet ist, ob Bluetooth auf dem Smartphone aktiviert ist und ob AeroText ausgeführt wird.

Bei fehlender Verbindung zwischen NovaChat/ChatFusion und Smartphone wird das



Symbol im Display des NovaChats/ChatFusions angezeigt. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, verschwindet das Symbol.

Bei anhaltenden Verbindungsproblemen wählen Sie auf dem NovaChat/ChatFusion das Menü „Einstellungen -> System -> Bluetooth / Lautsprecher & Telefon -> Mit Telefon verbinden“ und wählen Sie das Telefon, auf dem AeroText läuft, manuell aus.

Nachrichten (SMS) senden und empfangen

Der NovaChat/ChatFusion nutzt folgende Begriffe:

Unterhaltungen: Unterhaltungen bezeichnen die zusammengefassten Nachrichten von und an einen einzelnen Absender/Empfänger.

Nachrichten: Dies bezeichnet alle zu einer ausgewählten Unterhaltung gehörenden Nachrichten, d.h. sämtliche Kommunikation mit dem jeweiligen Kontakt.

Nachrichtendetails: Hiermit ist eine einzelne Nachricht aus der ausgewählten Unterhaltung gemeint.

Kontakte: Dies bezeichnet alle auf dem Smartphone angelegten Kontakte. Sind zu einem Kontakt mehrere Telefonnummern gespeichert, verwendet AeroText i. d. R. die Mobilfunknummer. Die zugehörige Rufnummer wird bei jedem Kontakt angezeigt. Achten Sie darauf, keine Textnachrichten an Festnetznummern zu senden.

Zur Nutzung der Nachrichtenfunktionalität


Wir empfehlen folgende Vorgehensweise zur effektiven Nutzung der Funktionalität „Textnachrichten / SMS senden und empfangen“:

1. Erzeugen Sie eine Seite „**SMS-Unterhaltungen**“ zum Anzeigen aller Unterhaltungen. Gestalten Sie diese Seite wie unten beschrieben mit Feldern, die mit der Funktion „SMS – Seite Nachrichten anzeigen“ belegt sind. Machen Sie diese Seite zur Spezialseite „SMS-Konversationen“. Dies ist i.d.R. die Einstiegsseite in den Bereich „SMS“.
2. Erzeugen Sie eine Seite „**SMS-Nachrichten**“ zum Anzeigen aller Nachrichten einer Unterhaltung. Gestalten Sie diese Seite wie unten beschrieben mit Feldern, die mit der Funktion „SMS – Seite Nachrichtendetails anzeigen“ belegt sind. Machen Sie diese Seite zur Spezialseite „SMS-Nachrichten“.
3. Erzeugen Sie eine Seite „**SMS-Nachrichtendetails**“ zum Anzeigen einer einzelnen Nachricht. Gestalten Sie diese Seite wie unten beschrieben mit einem (großen) Feld, das mit der Funktion „SMS – Nachrichtendetails“ belegt ist. Machen Sie diese Seite zur Spezialseite „SMS-Nachrichtendetails“.
4. Erzeugen Sie eine Seite „**SMS-Kontakte**“. Gestalten Sie diese Seite wie unten beschrieben mit Feldern, die mit der Funktion „SMS – Kontakt“ plus der Funktion „SMS – Neue Nachricht“ belegt sind. Machen Sie diese Seite zur Spezialseite „SMS-Kontakte“.
5. Belegen Sie eine Taste auf einer Seite Ihrer Wahl mit der Funktion „SMS-Seite Unterhaltungen anzeigen“. Diese Taste öffnet die in Schritt 1 angelegte Seite „SMS-Unterhaltungen“.
6. Wenn Sie die Funktion „Beantworten“ oder „Textfenster als SMS senden“ verwenden, wird die SMS an den an den gerade ausgewählten Kontakt gesendet.
7. Um eine SMS an einen Kontakt Ihrer Wahl zu senden, öffnen Sie die in Schritt 4 angelegte Seite „SMS-Kontakte“ und wählen Sie den Kontakt manuell aus. Verfassen Sie dann die gewünschte Nachricht.

Wie Sie die vier zur SMS-Kommunikation benötigten Spezialseiten markieren, erfahren Sie ab Seite 243.

SMS – Seite Unterhaltungen

Diese Seite zeigt Ihnen alle Ihre Unterhaltungen an. Positionieren Sie beliebig viele Tasten mit der Aktivität „SMS – Seite Nachrichten anzeigen“ auf der Seite. Jede dieser Tasten zeigt eine Unterhaltung an und öffnet sie auf Tastendruck. Da man i.d.R. mehr Unterhaltungen als dafür vorgesehene Felder auf der Seite hat, sollte man die Tasten „vorige“ und „weitere“ zum Blättern unterbringen. Wichtig. Damit die Tasten „vorige“ und „weitere“ funktionieren, dürfen auf der Seite „SMS-Unterhaltungen“ nur Tasten mit der Belegung „SMS – Seite Nachrichten anzeigen“ verwendet werden!
Beispiel für eine Seite „SMS-Unterhaltungen“

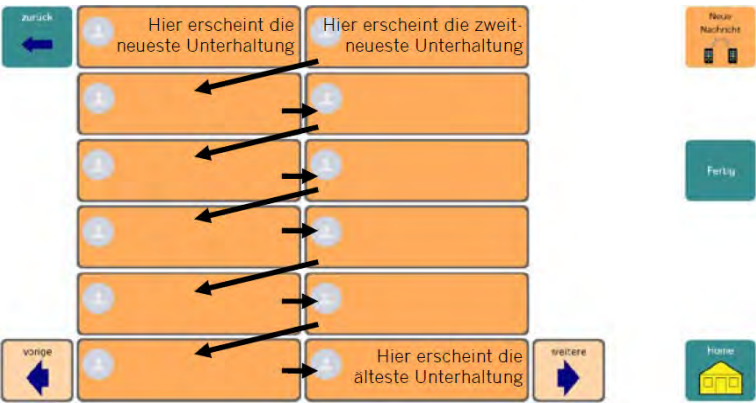


Tippen Sie auf eine Unterhaltung, um alle Nachrichten der Unterhaltung anzuzeigen.

SMS – Seite Nachrichten

Diese Seite zeigt Ihnen alle Nachrichten innerhalb einer Unterhaltung (= alle Nachrichten eines Kontaktes) an. Positionieren Sie beliebig viele Tasten mit der Aktivität „SMS – Seite Nachrichtendetails anzeigen“ auf der Seite. Da Unterhaltungen mehr Nachrichten enthalten können als dafür Felder auf der Seite zur Verfügung stehen, sollte man die Tasten „vorige“ und „weitere“ zum Blättern unterbringen.

Wichtig. Damit die Tasten „vorige“ und „weitere“ funktionieren, dürfen auf der Seite „SMS-Nachrichten“ nur Tasten mit der Belegung „SMS – Seite Nachrichtendetails anzeigen“ verwendet werden!

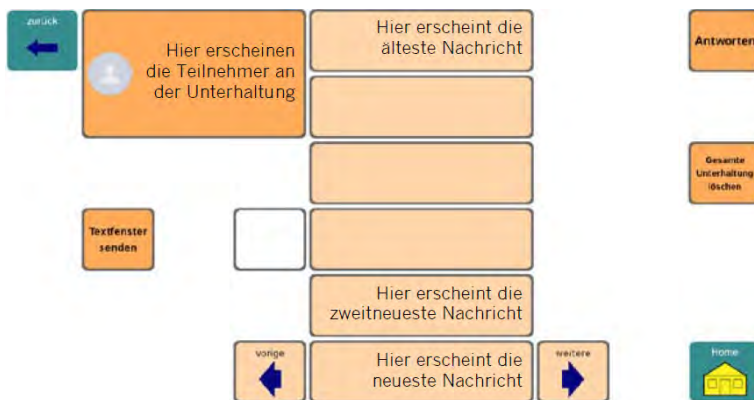


Beispiel für eine Seite „SMS-Nachrichten“

Tippen Sie auf eine Nachricht, um die Nachricht vollständig anzuzeigen.

SMS – Seite Nachrichtendetails

Diese Seite zeigt Ihnen die Details einer ausgewählten Nachricht innerhalb einer Unterhaltung an. Positionieren Sie eine ausreichend große Tasten mit der Aktivität „SMS – Nachrichtendetails“ auf der Seite.

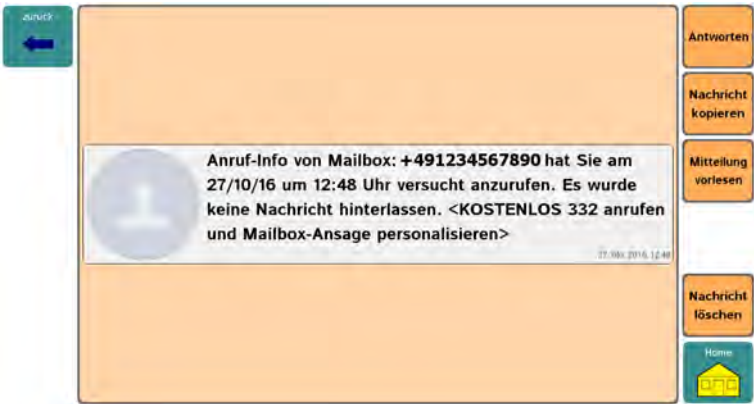


Beispiel für eine Seite „SMS-Nachrichtendetails“

SMS – Seite Kontakte

Diese Seite zeigt Ihre Kontakte in alphabetischer Reihenfolge an, so wie sie in Ihrem Smartphone gespeichert sind. Positionieren Sie beliebig viele Tasten mit der Aktivität „SMS-Kontakt“ auf der Seite. Da man i.d.R. mehr Kontakte hat, als dafür Felder auf der Seite zur Verfügung stehen, sollte man die Tasten „vorige“ und „weitere“ zum Blättern unterbringen.


Wichtig. Damit die Tasten „vorige“ und „weitere“ funktionieren, dürfen auf der Seite „SMS-Kontakte“ nur Tasten mit der Belegung „SMS-Kontakt“ verwendet werden!

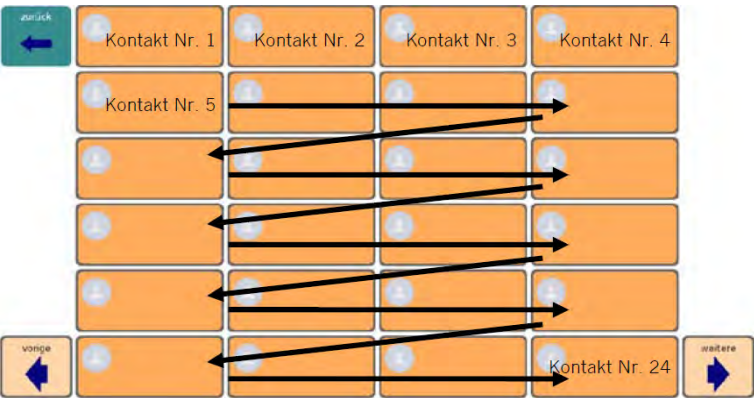

Beispiel für eine Seite „SMS-Kontakte“

SMS-Seiten zu Spezialseiten machen

Nachdem Sie die Seiten „SMS-Unterhaltungen“, „SMS-Nachrichten“, „SMS-Nachrichtendetails“ und „SMS-Kontakte“ angelegt haben, müssen Sie sie als Spezialseiten markieren. Erst dann funktionieren sie wie gewünscht.

- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Setzen Sie den Haken bei „Editiermodus“
- Wählen Sie „Seiten“.
- Scrollen Sie runter, bis die Seite „SMS-Unterhaltungen“ angezeigt wird.

Schule Räume
SMS-Kontakte
SMS-Nachrichten
SMS-Nachrichtendetails
SMS-Unterhaltungen
Spiel
Short

- Tippen und halten Sie auf „SMS-Unterhaltungen“. Das Kontextmenü öffnet sich. Wählen Sie „Zur Spezialseite machen“. Wählen Sie „SMS – Unterhaltungen“.

Öffnen
Duplizieren
Zur Spezialseite machen
Als Vorlage speichern...
Scan-Editor
Umbenennen
Löschen

Zur Spezialseite machen
SMS - Kontakte
SMS - Nachrichten
SMS - Nachrichtendetails
SMS - Unterhaltungen
Startseite


- Die Seite ist als Spezialseite markiert.

Schule Räume
SMS-Kontakte
SMS-Nachrichten
SMS-Nachrichtendetails
☑ SMS-Unterhaltungen
Spiel
Short


- Tippen und halten Sie auf „SMS-Nachrichten“.

Schule Räume
SMS-Kontakte
SMS-Nachrichten
SMS-Nachrichtendetails
☑ SMS-Unterhaltungen
Spiel
Short


- Das Kontextmenü öffnet sich.
- Wählen Sie „Zur Spezialseite machen“. Wählen Sie „SMS – Nachrichten“.

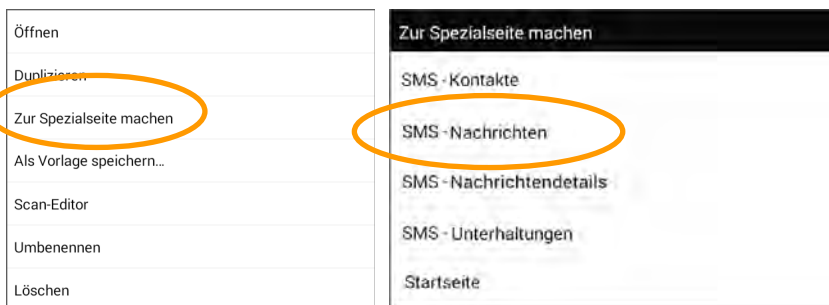

- Die Seite wird als Spezialseite markiert.

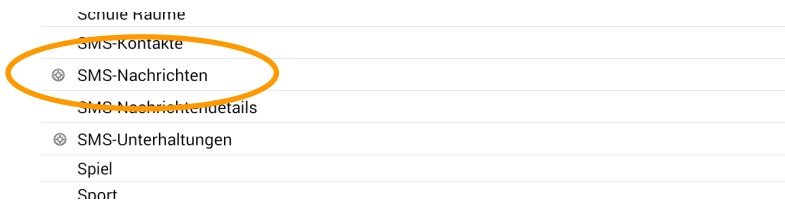


- Tippen und halten Sie auf „SMS-Nachrichtendetails“.

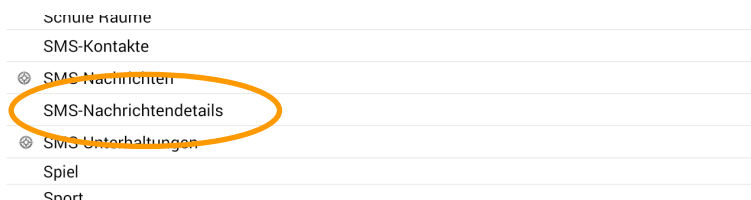


- Das Kontextmenü öffnet sich.
- Wählen Sie „Zur Spezialseite machen“. Wählen Sie „SMS – Nachrichtendetails“.




- Die Seite wird als Spezialseite markiert.

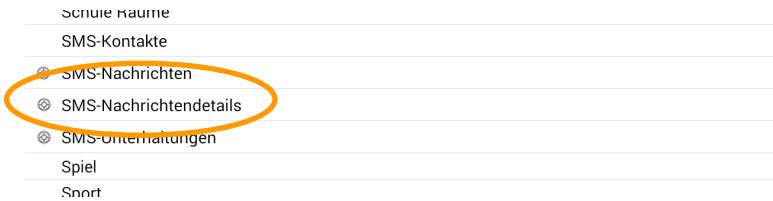


- Tippen und halten Sie auf „SMS-Kontakte“.

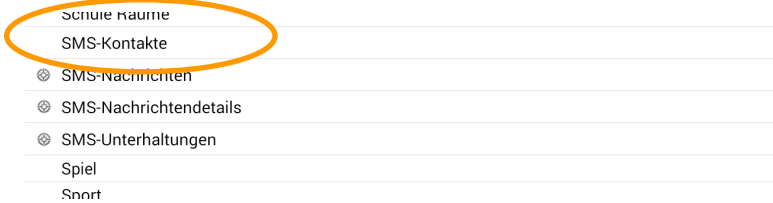


- Das Kontextmenü öffnet sich.
- Wählen Sie „Zur Spezialseite machen“. Wählen Sie „SMS – Kontakte“.

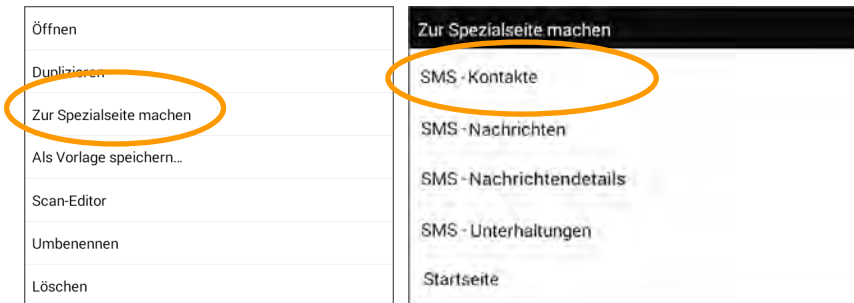

- Die Seite wird als Spezialseite markiert.

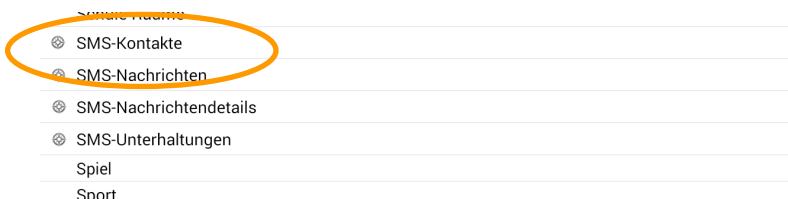

- Drücken Sie die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .
- Entfernen Sie den Haken bei „Editiermodus“.
- Schließen Sie das Menü.

Liste der Tastenfunktionen zur Nutzung von SMS

Name	Funktion
Fertig	Entspricht der Funktion „Senden“ bzw. „Kontakt anlegen“. Belegen Sie eine Taste mit dieser Funktion, wenn der Benutzer des NovaChats/ChatFusions nicht in der Lage ist, die im Textfenster angezeigte Taste zu betätigen. Betätigen Sie die Taste „Fertig“ bei leerem Textfenster zum Abbrechen des Sendens bzw. des Kontakt Anlegens.
SMS - Kontakt	Zeigt je einen Kontakt auf einer als „SMS – Kontakte“ markierten Spezialseite an.
SMS - Nachricht	Zeigt je eine Nachricht auf einer als „SMS – Nachrichten“ markierten Spezialseite an.
SMS - Nachricht kopieren	Kopiert den Inhalt einer Nachricht in die Zwischenablage.
SMS - Nachricht löschen	Löscht die ausgewählte Nachricht.
SMS - Nachricht vorlesen	Liest die ausgewählte Nachricht vor.
SMS - Nachrichtendetails	Zeigt die ausgewählte Nachricht vollständig an. Nutzen Sie hierfür eine ausreichend große Taste.
SMS - Neue Nachricht	Öffnet die Seite „SMS – Kontakte“ zur Auswahl des Empfängers der neuen Nachricht
SMS - Seite Kontakte anzeigen	Öffnet die als Spezialseite „SMS-Kontakte“ markierte Seite.
SMS - Seite Nachrichten anzeigen	Öffnet die als Spezialseite „SMS-Nachrichten“ markierte Seite.
SMS - Seite Nachrichtendetails anzeigen	Öffnet die als Spezialseite „SMS-Nachrichtendetails“ markierte Seite.
SMS - Seite Unterhaltungen anzeigen	Öffnet die als Spezialseite „SMS-Unterhaltungen“ markierte Seite.
SMS - Teilnehmer	Zeigt die Teilnehmer der ausgewählten Nachricht vollständig an. Nutzen Sie hierfür eine ausreichend große Taste.
SMS - Textfenster als SMS senden	Der aktuelle Inhalt des Textfensters wird als Textnachricht (SMS) an den aktiven Kontakt versendet. Wählen Sie den Kontakt aus, bevor Sie die Funktion verwenden!
SMS - Unterhaltung	Zeigt je eine Unterhaltung auf einer als „SMS – Unterhaltungen“ markierten Spezialseite an.
SMS - Unterhaltung löschen	Löscht die aktuelle ausgewählte Unterhaltung.
SMS - Vorige	Zeigt die vorigen Kontakte/Mitteilungen/Unterhaltungen auf einer entsprechend markierten Spezialseite.
SMS - Weitere	Zeigt die nächsten Kontakte/Mitteilungen/Unterhaltungen auf einer entsprechend markierten Spezialseite.
SMS - Zu Kontakten hinzufügen	Fügt den Absender der aktuellen Textnachricht (SMS) zu den Kontakten hinzu.

Erläuterung der SMS-Symbole im Textfenster

Bei bestehender Bluetooth-Verbindung zwischen Ihrem Smartphone und Ihrem NovaChat/ChatFusion werden ggf. folgenden Symbole im Textfenster angezeigt:



Sie haben eine neue Textnachricht (SMS) erhalten.



Sie haben mehrere neue Textnachrichten (SMS) erhalten.



Das Smartphone ist nicht verbunden.




Die Software auf dem Smartphone ist nicht kompatibel zur Software auf dem NovaChat/ChatFusion.



AeroText wurde auf dem Smartphone nicht zur Standardnachrichten-App gemacht. In diesem Fall ist die Funktionalität stark eingeschränkt.



Beenden Sie das Verfassen einer Textnachricht (SMS) durch Tippen auf die Taste „Senden“ im Textfenster.
Alternativ tippen Sie auf eine mit der Funktion „Fertig“ belegte Taste.

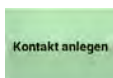

Beenden Sie das Anlegen eines Kontaktes durch Tippen auf die Taste „Kontakt anlegen“ im Textfenster.
Alternativ tippen Sie auf eine mit der Funktion „Fertig“ belegte Taste.

SICHERN & WIEDERHERSTELLEN

Vokabulare sichern und übertragen

Es ist wichtig, dass Sie regelmäßig Sicherungskopien Ihres aktuellen Vokabulars bzw. Ihrer aktuellen Vokabulare machen. Im Fall eines Datenverlustes haben Sie dann die Möglichkeit, die letzte Sicherung wieder einzuspielen und müssen Vokabularerweiterungen nicht erneut einspeichern. Das Menü Bibliothek ermöglicht das Sichern und Wiederherstellen von Vokabularen.

NovaChat und ChatFusion bieten 3 Möglichkeiten des Sicherns und Wiederherstellens von Vokabular:

1. Sichern & Wiederherstellen über USB

Wählen Sie Vokabulare aus und übertragen Sie sie einfach von und zu einem an das Gerät angeschlossenen USB-Stick.

2. Sichern und Wiederherstellen vom Computer

Verbinden Sie NovaChat und Computer mit dem mitgelieferten USB-Verbindungskabel und starten Sie den Chat-Editor auf dem PC. Wählen Sie dann im Chat-Editor aus, welche Vokabulare sie in den NovaChat exportieren bzw. vom NovaChat importieren wollen.





3. Sichern und Wiederherstellen auf dem NovaChat

Sie können Vokabulardateien auch direkt auf dem NovaChat-Gerät sichern und von dort wiederherstellen. Der Vorteil ist, dass Sie weder USB-Stick noch Kabel & PC brauchen. Der Nachteil ist, dass im Falle eines Speicherproblems die Sicherungsdateien evtl. nicht mehr gelesen werden können.


Vokabulare sichern und wiederherstellen über USB




Zusammen mit dem NovaChat haben Sie einen USB-Stick mit je einem Standard- und einem Micro-USB-Stecker bzw. USB-C-Stecker erhalten (linke Abb.). Alternativ können Sie jeden beliebigen USB-Stick mittels USB-auf-Micro-USB-Adapter bzw. USB-auf-USB-C-Adapter verwenden (mittlere Abb.). Legen Sie auf dem USB-Stick einen Ordner z. B. namens „NC-Backup“ an. Schließen Sie den USB-Stick an den NovaChat an (rechte Abb.).

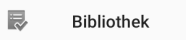- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wählen Sie „Bibliothek“ .
- Drücken Sie erneut die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

- Wählen Sie „Import/Export“ Import/Export
- Der Inhalt des USB-Sticks wird angezeigt.

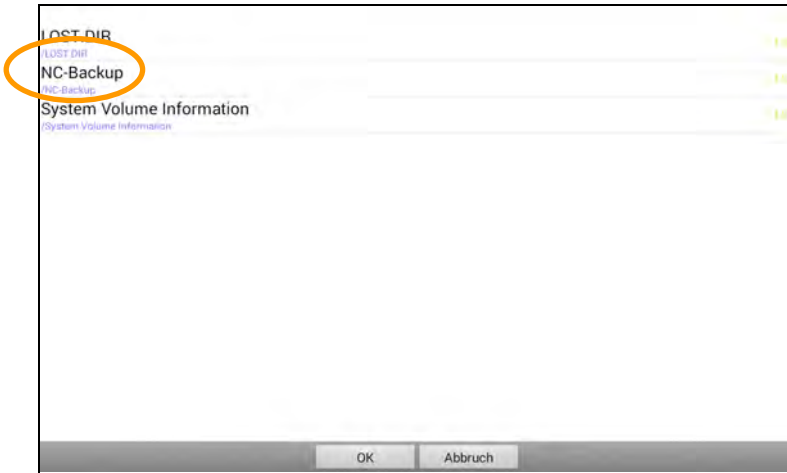

- Tippen Sie auf den Ordner „NC-Backup“ und anschließend auf „OK“. Der Ordner ist nun der Sicherungs-Ordner.

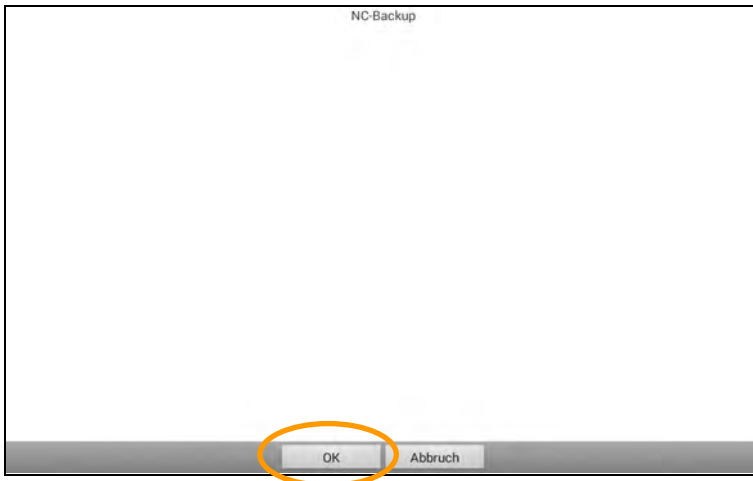

- Die auf dem Gerät und im Sicherungs-Ordner vorhandenen Vokabulare werden angezeigt.

Gerät		Sicherungs-Ordner
ABC 45 3.0	<input type="checkbox"/>	
ABC 45 3.0 Metacom	<input type="checkbox"/>	
ABC 50 3.0	<input type="checkbox"/>	
ABC 50 3.0 Metacom	<input type="checkbox"/>	
ABC 60 3.0	<input type="checkbox"/>	Zur Sicherung >>
ABC 60 3.0 Metacom	<input type="checkbox"/>	
FoXX50	<input type="checkbox"/>	<< Zum Gerät
LoGoFoXX 60 SMS	<input type="checkbox"/>	
LoGoFoXX 84	<input type="checkbox"/>	
MultiFoXX 24 v2.0	<input type="checkbox"/>	
WordPower60 SS SMS	<input type="checkbox"/>	
WordPower60 SS SMS (?)	<input type="checkbox"/>	


Vokabulare auf USB-Stick sichern

- Tippen Sie in der linken Spalte auf alle Vokabulare, die Sie sichern wollen. Ausgewählte Vokabulare haben einen Haken in dem Kästchen hinter dem Namen.

Gerät		Sicherungs-Ordner
ABC 45 3.0	<input type="checkbox"/>	
ABC 45 3.0 Metacom	<input type="checkbox"/>	
ABC 50 3.0	<input type="checkbox"/>	
ABC 50 3.0 Metacom	<input type="checkbox"/>	
ABC 60 3.0	<input type="checkbox"/>	Zur Sicherung >>
ABC 60 3.0 Metacom	<input type="checkbox"/>	
FoXX50	<input type="checkbox"/>	<< Zum Gerät
LoGoFoXX 60 SMS	<input checked="" type="checkbox"/>	
LoGoFoXX 84	<input checked="" type="checkbox"/>	
MultiFoXX 24 v2.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
WordPower60 SS SMS	<input type="checkbox"/>	
WordPower60 SS SMS (?)	<input type="checkbox"/>	


- Tippen Sie anschließend auf den Button „Zur Sicherung>>“. Die Vokabulare werden auf den USB-Stick kopiert.
- Ist ein Vokabular bereits auf dem USB-Stick vorhanden, werden Sie gefragt, ob Sie das vorhandene Vokabular überschreiben wollen. Wenn Sie „Nein“ wählen, können Sie das Vokabular umbenennen.



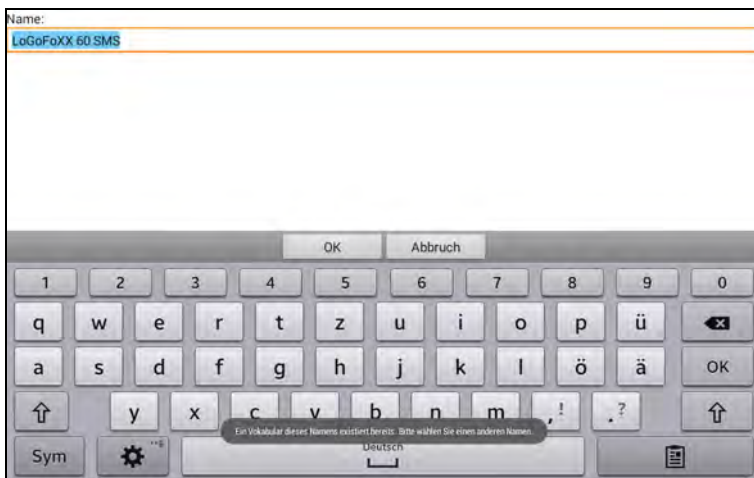

Vokabulare von USB-Stick wiederherstellen

- Tippen Sie in der rechten Spalte auf alle Vokabulare, die Sie wiederherstellen wollen. Ausgewählte Vokabulare werden mit einem Haken in dem Kästchen hinter dem Namen angezeigt.

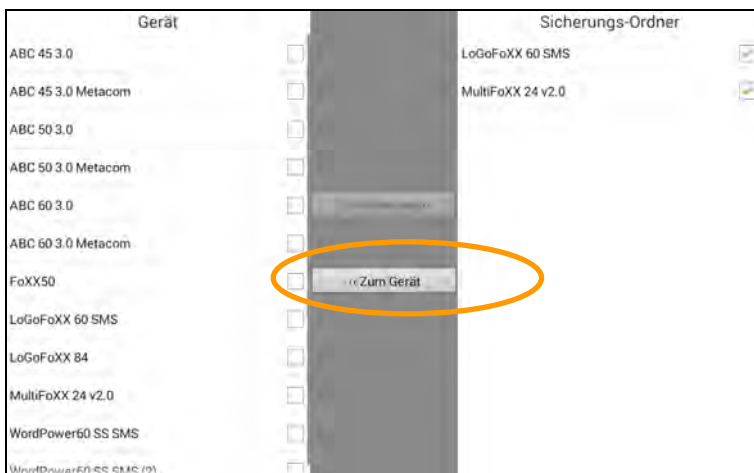


- Tippen Sie anschließend auf den Button „<< Zum Gerät“. Die Vokabulare werden auf den NovaChat kopiert.
- Ist ein Vokabular bereits auf dem NovaChat vorhanden, werden Sie gefragt, ob Sie das vorhandene Vokabular überschreiben wollen. Wählen Sie „Nein“, um den Vorgang abzubrechen. Benennen Sie das Vokabular auf dem USB-Stick um und wiederholen Sie den Vorgang.

Vokabulare sichern und wiederherstellen über PC



Das Übertragen von Daten (Vokabulare, Seiten, Tasten, Bilder) zwischen NovaChat-Gerät und Chat-Editor erfolgt mit dem mitgelieferten USB-Sync-Kabel

Vokabular vom Chat-Editor auf den NovaChat übertragen

- Stellen Sie sicher, dass das NovaChat-Gerät eingeschaltet ist und auf dem PC der Chat-Editor ausgeführt wird.
- Verbinden Sie NovaChat-Gerät und PC mit dem mitgelieferten USB-Sync-Kabel.
- Im Chat-Editor sollte der Hinweis „Gerät ist verbunden“ erscheinen.
- Öffnen Sie auf dem Chat-Editor das Menü **Bibliothek**.

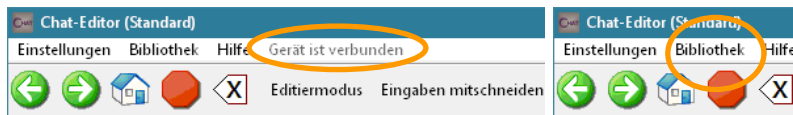


- Wählen Sie die Option **Übertragen – Vokabular zum/vom NovaChat-Gerät**.

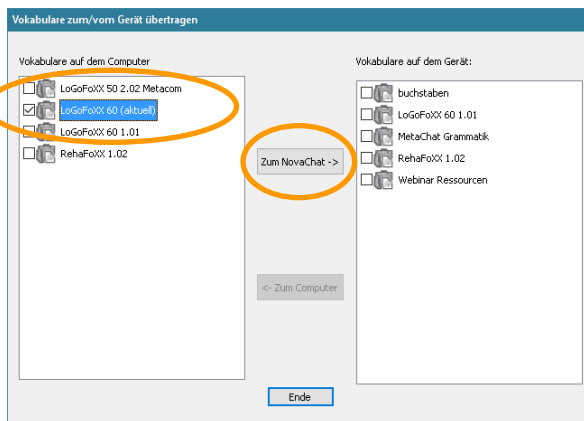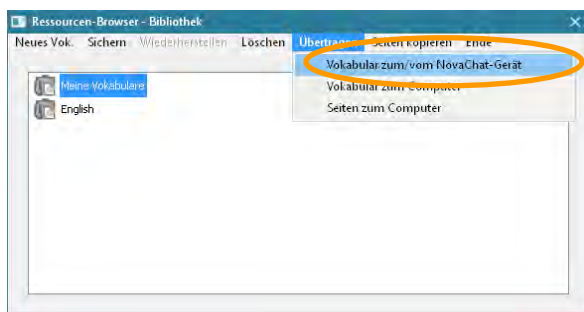



- Markieren Sie alle Vokabulare, die Sie auf das Gerät übertragen wollen.
- Klicken Sie anschließend auf die Taste **Zum NovaChat ->**.

Vokabular vom NovaChat-Gerät zum Chat-Editor übertragen

- Stellen Sie sicher, dass das NovaChat-Gerät eingeschaltet ist und auf dem PC der Chat-Editor ausgeführt wird.
- Verbinden Sie NovaChat-Gerät und PC mit dem mitgelieferten USB-Sync-Kabel.
- Im Chat-Editor sollte der Hinweis „Gerät ist verbunden“ erscheinen.
- Öffnen Sie auf dem Chat-Editor das Menü **Bibliothek**.

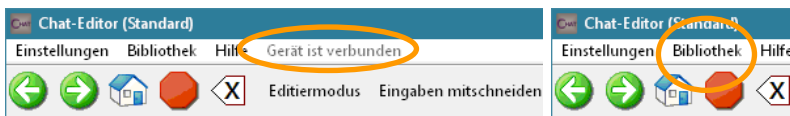

- Wählen Sie die Option **Übertragen – Vokabular zum/vom NovaChat-Gerät**.

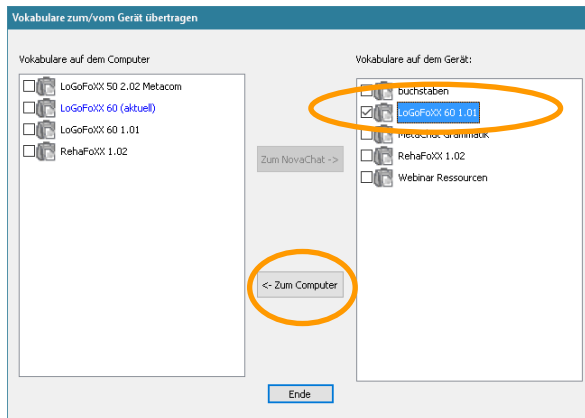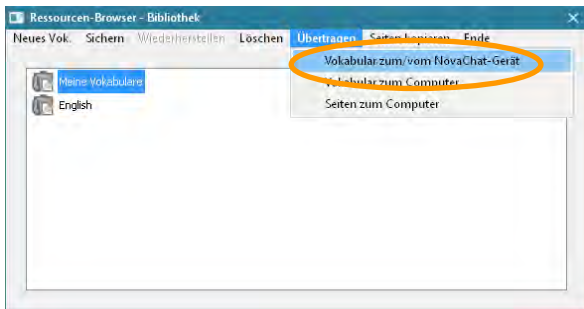


- Markieren Sie alle Vokabulare, die Sie zum Chat-Editor übertragen wollen.
- Klicken Sie anschließend auf die Taste **<- Zum Computer**.




Achtung: wie bei jedem mobilen Gerät besteht auch beim NovaChat die Gefahr eines Datenverlustes. Sie sollten daher immer eine Sicherheitskopie Ihres Vokabulars auf einem PC anlegen.

Vokabular vom Chat-Editor als Datei exportieren

- Öffnen Sie das Menü **Bibliothek**.

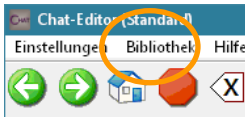


- Wählen Sie die Option **Übertragen – Vokabular zum Computer**.

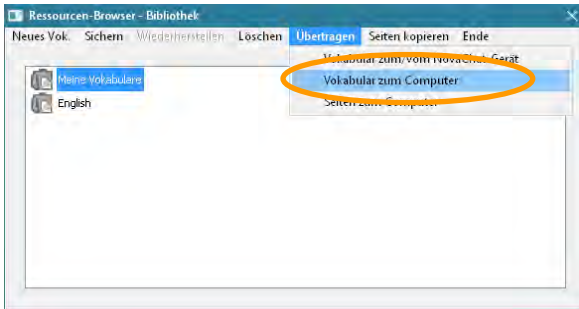

- Wählen Sie das zu übertragende Vokabular aus. Klicken Sie auf **Übertragen**.




- Geben Sie einen Dateinamen ein und wählen Sie **Speichern**.

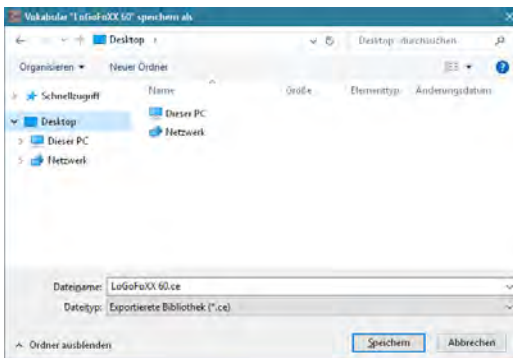


Vokabulardatei in den Chat-Editor importieren

Bei der Installation hat der Chat-Editor eine Verknüpfung mit dem Ordner **Chat Editor Import** auf dem Desktop angelegt.

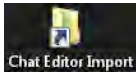


Sollte die Verknüpfung nicht mehr auf Ihrem Desktop sein, so finden Sie den Ordner für Importe unter `C:\Benutzer\USERNAME\AppData\Roaming\Chat_Editor\Import`, wobei `USERNAME` der Name des gerade aktuell an Windows angemeldeten Benutzers ist.


- Ziehen Sie die Vokabulardatei (*.ce) mit der Maus auf den Ordner und lassen Sie die Maustaste los (Ziehen & Ablegen).

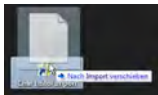

- Alternativ ziehen Sie die Vokabulardatei (*.ce) mit der Maus auf das Fenster des Chat-Editors und lassen Sie sie dort los (Ziehen & Ablegen).

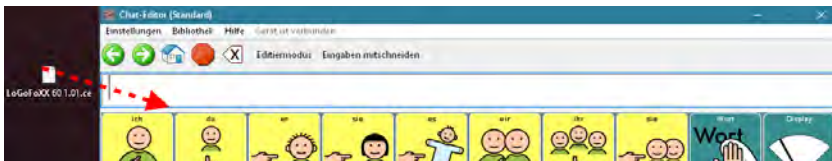

- Der Chat-Editor erkennt die Datei nach einem kurzen Moment und importiert sie automatisch. Sollte ein Vokabular mit der gleichen Kennung bereits vorhanden sein, werden Sie gefragt, ob Sie das Vokabular überschreiben wollen.

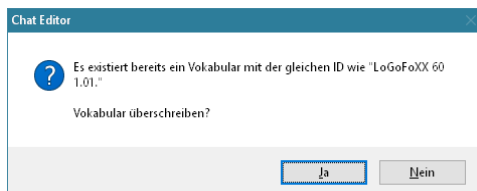

- Der Importvorgang wird durchgeführt.




Bibliothek

Die Bibliothek ist die Gesamtheit aller im NovaChat enthaltenen Vokabulare, Seiten, Tasten, Bilder und Sounds. Das Menü Bibliothek ermöglicht das Sichern und Wiederherstellen der Bibliothek.


Bibliothek sichern

Chat-Editor

- Wählen Sie das Menü **Bibliothek**.

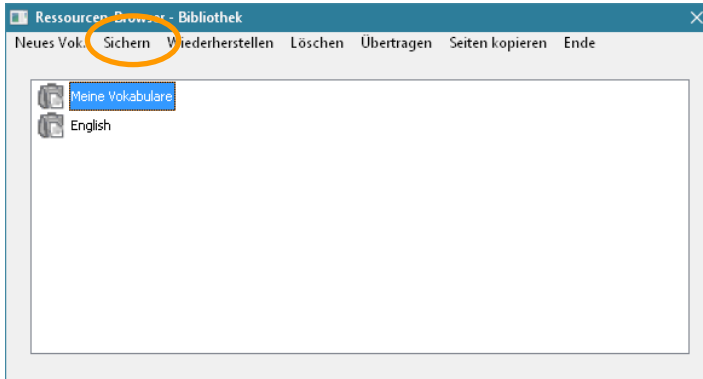


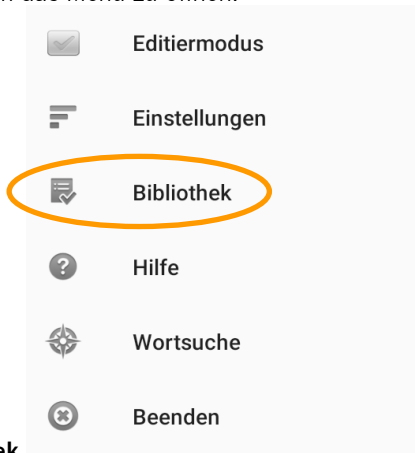
- Wählen Sie **Sichern**, um die Bibliothek zu sichern. Eine Sicherheitsabfrage erscheint:

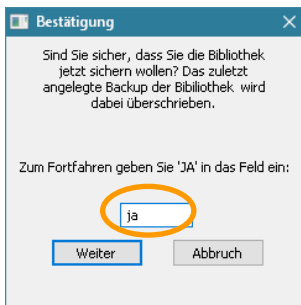


- Geben Sie **ja** in das Feld ein und wählen Sie **Weiter**.
- Die Bibliothek wird gesichert.

NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.



- Wählen Sie das Menü **Bibliothek**
- Drücken Sie erneut die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

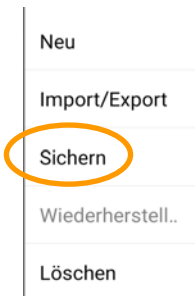

- Wählen Sie **Sichern**, um die Bibliothek zu sichern. Eine Sicherheitsabfrage erscheint:




- Wählen Sie **Ja**.
- Die Bibliothek wird gesichert.


Bibliothek wiederherstellen

Chat-Editor

- Wählen Sie das Menü **Bibliothek**.

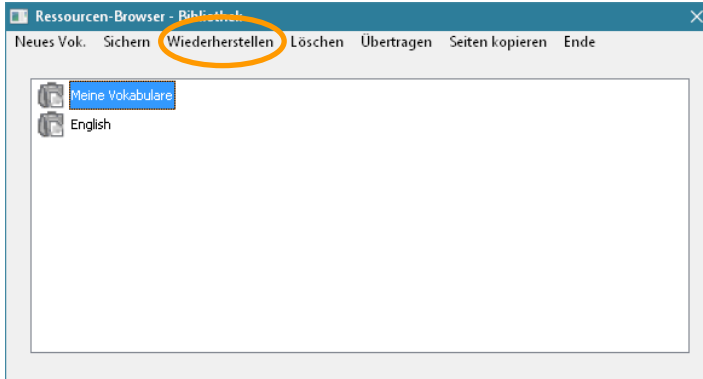

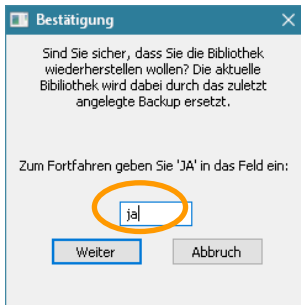


- Wählen Sie **Wiederherstellen**, um die Bibliothek aus der Sicherung wiederherzustellen. Eine Sicherheitsabfrage erscheint:




- Geben Sie **ja** in das Feld ein und wählen Sie **Weiter**.
- Die Bibliothek wird wiederhergestellt.

NovaChat-Gerät


- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.

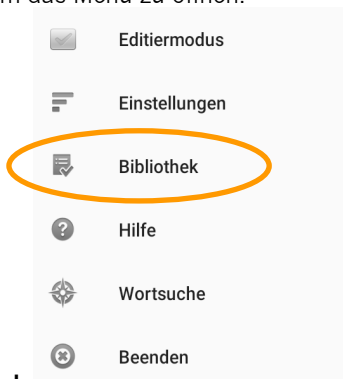


- Wählen Sie das Menü **Bibliothek**
- Drücken Sie erneut die Taste **MENÜ** auf dem Tablet .

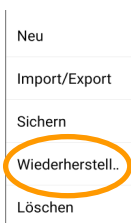

- Wählen Sie **Wiederherstellen**, um die Bibliothek aus der Sicherung wiederherzustellen. Eine Sicherheitsabfrage erscheint:

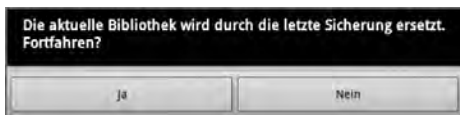

- Wählen Sie **Ja**. Eine Hinweismeldung erscheint:

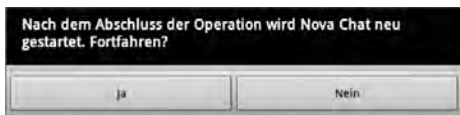

- Wählen Sie **Ja**. Eine weitere Hinweismeldung erscheint:




- Wählen Sie **OK**. Das NovaChat-Gerät wird neu gestartet.

Seiten drucken

Sie können einmal angelegte Seiten ausdrucken, um z.B. eine Symbolmappe anzulegen, die als Talkerersatz dienen kann in Umgebungen, in denen der NovaChat nicht verwendet werden kann.

Das Ausdrucken von Seiten ist nur mit dem Chat-Editor möglich, nicht mit dem Gerät.

- Wählen Sie **Einstellungen – Seiten drucken...**
- Setzen Sie neben jeder Seite, die gedruckt werden soll, einen Haken.

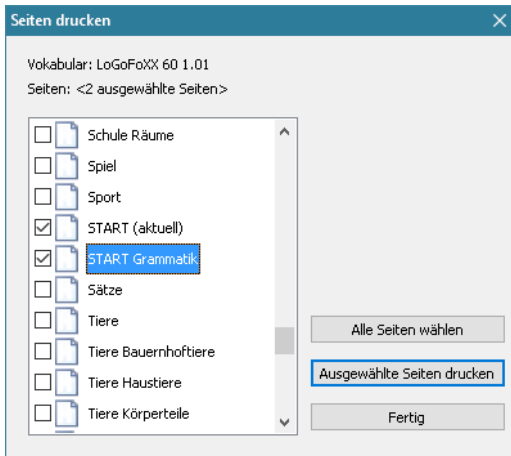

- Starten Sie die Druckausgabe durch Klicken auf **ausgewählte Seiten drucken**.
- Schließen Sie das Fenster durch Klicken auf **Fertig**.

SOFTWARE-UPDATE

Software-Update

Die im NovaChat verwendete Software Chat wird laufend weiterentwickelt, ebenso wie der Chat-Editor, die enthaltenen Symbolsysteme und die von PRD entwickelten Vokabulare.

Sofern mit dem Internet verbunden, können sich der Chat-Editor und der NovaChat (wenn nicht als geschlossene Anlage konfiguriert) selbsttätig aktualisieren.

Internetzugang einrichten

Chat-Editor

- Richten Sie eine Internetverbindung gemäß den Vorgaben Ihres Betriebssystems ein.


NovaChat-Gerät

- Tippen Sie auf das W-LAN-Symbol. Wählen Sie ihr W-LAN-Netz aus. Geben Sie den Sicherheitsschlüssel Ihres W-LAN-Netzes ein.


Auf Aktualisierung prüfen

Chat-Editor

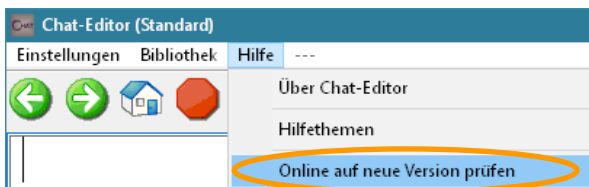

- Stellen Sie sicher, dass Ihr PC mit dem Internet verbunden ist.
- Wählen Sie *Hilfe - Online auf neue Version prüfen*. Warten Sie ein paar Sekunden.

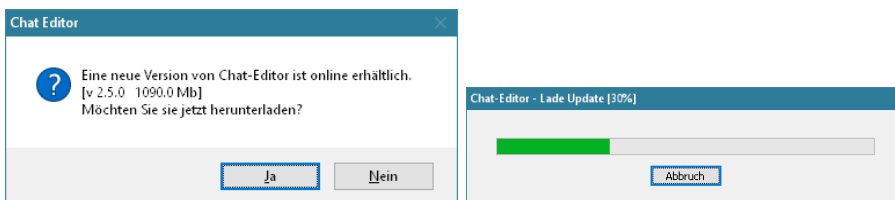


- Sofern der Chat-Editor eine neue Version findet, laden Sie die Datei herunter und installieren Sie sie. Der Ladevorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen!




NovaChat-Gerät

- Stellen Sie sicher, dass Ihr NovaChat-Gerät mit dem Internet verbunden ist.
- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.

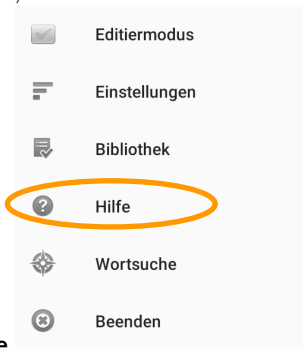

- Wählen Sie das Menü **Hilfe**
- Wählen Sie die Option **Suche nach Updates...**

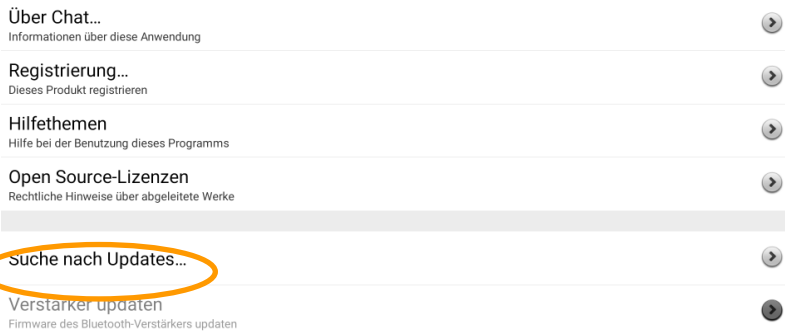


- Die aktuell installierte Version wird angezeigt, ebenso das Datum der letzten Prüfung sowie des letzten Updates.

2.27



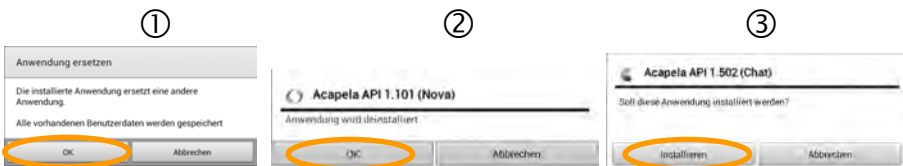


- Wählen Sie **Jetzt auf Updates prüfen**, um nach Updates zu suchen.
- Sofern der NovaChat eine neue Version findet, erfolgt der Download der zugehörigen Dateien automatisch.
- Nach dem Download erfolgt die Installation der Updatedateien.
- Je nach Modell und Android-Version müssen Sie ggf.
 - ① die Abfrage nach dem Ersetzen einer vorhandenen Anwendung bejahen,
 - ② eine Deinstallationserlaubnis für die zu ersetzende Anwendung und
 - ③ eine Installationserlaubnis für die neue Anwendung erteilen.



- Ein Update kann bis zu 15 zu ersetzenden Anwendungen enthalten.
- **Wichtiger Hinweis:** Ein Update kann einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen. Führen Sie ein Update nicht spontan durch, sondern planen Sie die Durchführung zu einem geeigneten Zeitpunkt.

Automatische Updates auf dem NovaChat-Gerät deaktivieren

Haben Sie keinen oder keinen guten Internetzugang, können Sie die automatische Suche deaktivieren. Sie verhindern so, dass das NovaChat-Gerät vor dem Starten zunächst versucht, per Internet auf den Software-Server von Saltillo zuzugreifen.

- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ**  oder tippen und halten Sie die Taste **ZURÜCK**  auf dem Tablet, um das Menü zu öffnen.
- Wählen Sie das Menü **Hilfe**.
- Wählen Sie die Option **Suche nach Updates...**
- Tippen Sie auf die Taste **MENÜ** .
- Entfernen Sie die beiden Haken bei **WLAN-Download erlauben** und **Auto-Installation**.

WLAN-Download erlauben

Updates nur im WLAN herunterladen

☐

Auto-Installation

Updates automatisch installieren

☐

- Das NovaChat-Gerät wird nun nicht mehr bei jedem Start nach Updates suchen.

Um Updates manuell durchzuführen, setzen Sie die beiden Haken bei **WLAN-Download erlauben** und **Auto-Installation** wieder. Tippen Sie dann auf den Button **Jetzt auf Updates prüfen**. Das NovaChat-Gerät sucht dann nach Updates. Findet es keine, entfernen Sie die beiden Haken bei **WLAN-Download erlauben** und **Auto-Installation** wieder.

FEHLERSUCHE & PANNENHILFE

Der NovaChat spricht nicht mehr

- Prüfen Sie, ob im Menü **Einstellungen – Sprachausgabe** der Haken bei **Spracheausgabe aus** gesetzt ist, und entfernen Sie diesen.
- Prüfen Sie, ob die Lautstärke auf null reduziert wurde.
- Prüfen Sie, ob der externe Verstärker eingeschaltet und mit dem NovaChat-Gerät gekoppelt und verbunden ist.

Benutzervokabular ist verschwunden

- Zeigt der NovaChat ein anderes als das Benutzervokabular, so öffnen Sie das Menü **Bibliothek** und wählen Sie das gewünschte Vokabular aus. Ist das gewünschte Vokabular nicht auf dem NovaChat-Gerät, importieren Sie es zuerst.
- Prüfen Sie, ob Tasten verborgen wurden. Setzen Sie im Menü **Einstellungen – Ansteuerung** im Abschnitt „Tastatur“ bei „**verborgene Tasten anzeigen**“ einen Haken, um alle ausgeblendeten Tasten sichtbar zu machen.

Der NovaChat reagiert nicht

Falls der NovaChat nicht mehr auf Eingaben reagiert, führen Sie einen Reset durch.

- Halten Sie dazu die I/O-Taste solange gedrückt, bis im Display ein Fenster mit den Optionen **Stumm-Modus**, **Offline-Modus** und **Ausschalten** angezeigt wird
- Tippen Sie auf **Ausschalten**. Das NovaChat-Gerät fährt herunter.
- Halten Sie die I/O-Taste solange gedrückt, bis das NovaChat-Gerät neu startet.

Das Textfenster wird nicht angezeigt

- Prüfen Sie, ob im Menü **Einstellungen – Layout – Textfenstergröße** die Option **ausgeblendet** gewählt ist.

Der NovaChat schaltet sich selber aus

Die Energie-Einstellungen des NovaChats sorgen dafür, dass sich das Gerät selbst ausschaltet, wenn es eine Weile nicht benutzt wurde.

- Prüfen Sie, welche Einstellungen im Menü **System – Display / Energie – Bildschirm ausschalten** gemacht wurden. Stellen Sie die Zeit bis zum Ausschalten des Displays auf 10 Minuten.

Das Display ist zu dunkel

Die Hintergrundbeleuchtung kann verändert werden.

- Prüfen Sie, welche Einstellungen im Menü **System – Display / Energie – Helligkeit** gemacht wurden.

Die Displayhelligkeit schwankt ständig

Die Hintergrundbeleuchtung kann sich automatisch an das Umgebungslicht anpassen. Das kann zu schwankender Displayhelligkeit führen.

- Deaktivieren Sie die Option **automatische Helligkeit** im Menü **System – Display / Energie – Helligkeit**.

Die Tastenfelder lassen sich nicht auslösen

- Prüfen Sie, ob im Menü **Ansteuerung – Verzögerungszeiten – Drückdauer** eine Verzögerungszeit eingestellt wurde.

Ein Bild füllt die Taste nicht aus

- Setzen Sie den Haken bei **Layout – Bilder - Füllen**, damit das Bild die ganze Tastenfläche einnehmen kann.
- Verkürzen Sie das Tastenlabel, damit für das Bild mehr Tastenfläche zur Verfügung steht.
- Entfernen Sie das Label, damit das Bild die ganze Tastenfläche einnehmen kann.

Bei (*Name des Vokabulars*) handelt es sich um eine Originaldatei, die nicht verändert werden kann

Mitgelieferte Standardvokabulare können nicht bearbeitet werden. Erstellen Sie zunächst eine Kopie und bearbeiten Sie diese.

- Öffnen Sie das Menü **Bibliothek**, tippen Sie auf das Vokabular, das Sie nutzen wollen, und wählen Sie **Duplizieren** aus dem Menü. Geben Sie dem Vokabular einen neuen Namen.

NovaChat zeigt englische Menüs an

Sollte der NovaChat englische Menüs anzeigen, stellen Sie die Menüsprache wieder auf Deutsch um:

- Öffnen Sie das Menü **Settings**
- Wählen Sie **Language**.
- Wählen Sie **German**.

INDEX

1

- 1 Auswahl von Seite 54, 55
- 1 Auswahl von Seite (Tastenfunktion) 100

2

- 24-h-Format 229

A

- AeroText installieren 236
- AeroText konfigurieren 237
- AeroText zur Standardnachrichten-App machen 237
- Aktiv (Kopfmaus) 184
- Alle animieren (Seiten-Animationen) 207
- Alle Auswahlseiten schließen 55
- Alle Modifizierer löschen (Tastenfunktion) 100
- Alle Seiten (Scan-Editor) 68
- Alle Seiten schließen (Tastenfunktion) 100
- Alle Untergruppen automatisch erzeugen (Scan-Editor) 70
- Alle Untergruppen automatisch hinzufügen (Scan-Editor) 73
- Alle Wörter löschen (Wortvorhersage) 201
- Allgemein (Tasteneigenschaften) 83
- Allgemeine Informationen über den NovaChat 11
- Als Standard verwenden (Scan-Editor) 76
- Als Startseite festlegen 64
- Alternative Ansteuerung 169
- Android-Anwendung öffnen 140
- Android-Anwendung öffnen (Tastenfunktion) 100
- Animation 53, 54
- Animierter Kreis (Kopfmaus) 183
- Animierung 178
- Anonyme Nutzungsdaten teilen 231
- Ansagen 178
- Ansagen aktivieren 179
- Ansagenstimme 179
- Ansteuerung 169

- Ansteuerung mit Tasten (Scanning) 170
- Anzahl der Durchläufe (Scanning) 174
- Anzeige-Intervall 210
- Art der Wortvorhersage wählen 197
- Audiodatei abspielen (Tastenfunktion) 100
- Audiodatei abspielen beenden (Tastenfunktion) 100
- Audiodatei einer Taste zuweisen 137
- Audiodatei wiedergeben 137
- Audiodateien wiedergeben 137
- Auf Aktualisierung prüfen 264
- Auf Seite bleiben für 1 Auswahl 55
- Auf Seite bleiben für 1 Auswahl (Tastenfunktion) 100
- Aufgezeichnete Daten in Datei speichern 233
- Aufgezeichnete Daten löschen 234
- Aus (Textfenster automatisch löschen) 190
- Ausgabegerät (Scanning) 179
- Ausgeblendet 208
- Ausgeblendet (Textfenster) 206
- Auslösepieton 228
- Aussprache 188
- Aussprachlexikon, Wort hinzufügen 188
- Auswahl nach Klicken (Verweilmethode, Kopfmaus) 186
- Auswählen (Symbol/Bild) 84
- Auto-Installation (Updates) 267
- Automatisch beenden 204
- Automatische Ausrichtung 180
- Automatische Großschreibung 202, 203
- Automatische Updates auf dem NovaChat-Gerät deaktivieren 267
- Auto-Restart (Scanning) 175
- Auto-Scan 171
- Auto-Upload 233

B

- Batterie- und Ladezustand 230
- Batteriestand (Tastenfunktion) 100
- Bearbeiten (Tastenfunktion) 99
- Bearbeiten einer Taste 82
- Beenden 22
- Begriffserklärung 14
- Beim Loslassen aktivieren 169
- Benachrichtigungen scannen 174

Benachrichtungszeile anzeigen 181
 Bennden von Chat 25
 Benutzer (RealizeLanguage) 233
 Beugungsmöglichkeiten, Übersicht 142
 Bevorzugte Ausrichtung 180
 Bibliothek 14, 21, 23
 Bibliothek (Menü) 258
 Bibliothek sichern 258
 Bibliothek wiederherstellen 260
 Bild auswählen 84
 Bild drehen 85
 Bild entfernen 85, 89
 Bild importieren 85, 89, 91
 Bild laden 87
 Bild suchen 84, 88
 Bilder (Layout) 206
 Bildname 85, 90, 92
 Bildschirm 19
 Bildschirm ausschalten 229
 Block (Scanning) 172
 Bluetooth / Lautsprecher & Telefon 227
 Bluetooth Berechtigungsanfrage (AeroText) 237

C

Chat beenden 25
 Chat-Editor 15, 23
 Chat-Editor installieren 15
 Chat-Editor starten 15
 Chat-Editor-Import-Ordner 257
 ChatPoint 181

D

Daten zurücksetzen 231
 Datum einstellen 229
 Datumsformat einstellen 230
 Dauer 204
 Dauerhaft auf eine andere Seite wechseln 53
 Details anzeigen (Kopfmaus) 187
 Display 19
 Display / Energie 228
 Display löschen (Tastenfunktion) 100, 162
 Drückdauer 169
 Drücken & Finden 179
 Duplizieren 28
 Durchscheinende Markierung 177
 Dynamisch (Scanning) 173

Dynamische Labels 142

E

Editiermodus 14, 21, 23, 24
 Eigenes Scan-Muster als Standard-Scan-Muster verwenden (Scan-Editor) 76
 Eigenes Scan-Muster entwerfen (Scan-Editor) 74
 Einer Taste ein Makro zuweisen 104, 105
 Einfügen (Textfenster) 162
 Eingaben mitschneiden 17
 Einrasten und Klicken (Verweilmethode, Kopfmaus) 187
 Einstellungen 21, 23
 Einzelne Seite löschen 77
 Entfernen (Bild) 89
 Entfernen (Symbol/Bild) 85
 Entfernen (Tastenfunktion) 98, 99
 Erläuterung der SMS-Symbole im Textfenster 247
 Erweitert (Kopfmaus) 185
 Export eines Vokabulars aus dem Chat-Editor 256
 Externen Verstärker benutzen 227

F

Farbe der Markierung 177
 Farben invertieren 177
 Farbverlauf 207
 Farbverlauf (Layout) 207
 Fehlermeldung Konnte nicht mit dem Telefon verbinden 238
 Feld Display löschen (X) einblenden 181
 Fertig (SMS) 246
 Fertig (Tastenfunktion) 100
 Fett (Taste bearbeiten) 94, 96
 Fette Schrift (Textfenster) 206
 Fingerführungsgitter verwenden 208
 Foto machen (Tastenfunktion) 100
 Füllen 206
 Funktion (Tasteneigenschaften) 98
 Für eine Auswahl auf eine andere Seite wechseln 54

G

Ganzer Bildschirm 203

Gedeht (Situationsbild) 57, 59
 Gelernte Wörter löschen
 (Wortvorhersage) 200
 Gerät ist verbunden 254, 255
 Geräte-Lautstärketasten deaktivieren
 231
 Geschwindigkeit 204
 Gesperrte Wörter (Wortvorhersage)
 199
 Geste 14
 Geste zuweisen (Vokabular) 35
 Gesten 179
 Gesten 65
 Glättung (Kopfmaus) 185
 Grammatikfunktionen 141
 Größe der Ruhezone (Kopfmaus) 185
 Gruppe und Untergruppen löschen
 (Scan-Editor) 74
 Gruppen erzeugen (Scan-Editor) 70

H

Hauptmenü 21
 Headpointer 181
 Heiligkeit 228
 Hilfe 21, 23
 Hilfsignal (Tastenfunktion) 100
 Hintergrundbild 50
 Hintergrundbild auswählen 57, 58
 Hintergrundbild importieren 57, 58
 Hintergrundfarbe 50
 Hintergrundfarbe (Taste bearbeiten)
 95, 96
 Hintergrundfarbe (Textfensterlayout)
 206
 Hinweise 2
 Hinzufügen (Tastenfunktion) 98, 99
 Hoch (Tastenfunktion) 98, 99
 Hochformat 180
 Horizontal (Tastengröße) 114
 Horizontale Empfindlichkeit (Kopfmaus)
 182

I

Im Menü anzeigen 210
 Import einer Vokabulardatei in den
 Chat-Editor 257
 Importieren (Bild) 89, 91
 Importieren (Symbol/Bild) 85
 Import-Ordner des Chat-Editors 257
 In Zwischenablage kopieren 17
 Indikator verbergen (Kopfmaus) 183

Indikatorfarbe (Kopfmaus) 183
 Indikatorform (Kopfmaus) 183
 Indikatorgröße (Kopfmaus) 183
 Inhaltsverzeichnis 3
 Internetbefehl (Webhook) 100
 Internetzugang einrichten 264

J

Jetzt auf Updates prüfen 266
 Jetzt hochladen 233

K

Keine Aktivität 180
 Keine Funktion (Tastenfunktion) 100
 Keine Visualisierung (Tastendruck) 180
 Kiosk-Modus 230
 Klicken und Ziehen (Verweilmethode,
 Kopfmaus) 186
 Kompatibilität Chat-Editor <->
 NovaChat-Editor 16
 Konnte nicht mit dem Telefon
 verbinden (Fehlermeldung) 238
 Kontakt (SMS) 246
 Kopfhörer (Scanning) 179
 Kopfhörer-Lautstärke (Scanning) 179
 Kopfmaus 181
 Kopfmaus aktivieren 182
 Kopieren (Textfenster) 162
 Kursiv (Taste bearbeiten) 94, 96
 Kursive Schrift (Textfenster) 206

L

Label (Taste bearbeiten) 83, 86
 Label oben (Taste bearbeiten) 97
 Label oben (Taste bearbeiten) 95
 Label sprechen (Scanning) 179
 Label sprechen (Tastenfunktion) 100
 Laden (Bild) 87
 Laden (Textfenster) 162
 Lauter (Tastenfunktion) 100
 Lautsprecher (Scanning) 179
 Layout 205
 Layout (Tasteneigenschaften) 94
 Leere Felder überspringen (Scanning)
 174
 Leiser (Tastenfunktion) 101
 Letzte Ausgabe wiederholen
 (Tastenfunktion) 101

Letzte Eingabe sprechen
 (Tastenfunktion) 162
 Letzten Satz sprechen (Tastenfunktion)
 101
 Letztes Wort sprechen (Tastenfunktion)
 101
 Lexikon wählen 197
 Linear (Scanning) 171
 Liste der Tastenfunktionen zur Nutzung
 von SMS 246
 Loslassdauer 169

M

Makro 104, 105
 Maximieren und Sprechen 180
 Mehrere Seiten löschen 78
 Menü aktivieren 181
 Menü Ansteuerung 169
 Menü Bibliothek 258
 Menü Layout 205
 Menü Menüsperre 211
 Menü Profile 214
 Menü Schreibhilfen 196
 Menü Sprachausgabe 188
 Menü Sprache 224
 Menü System 226
 Menü Textbausteine 192
 Menü-Leiste 209
 Menüs 20
 Menüsperre 211
 Menüsperre ausschalten 212
 Menüsperre einschalten 212
 Menü-Taste 208
 Mit Taste verbinden 228
 Mit Telefon verbinden 227
 Mit Verstärker verbinden 227
 Mitschneiden beenden 18
 Mitschneiden deaktivieren 18
 Mitschnitt 17
 Mitschnitt löschen 18
 Mitteilung (Taste bearbeiten) 83, 86
 Mitteilung anzeigen 203
 Mitteilung anzeigen (Tastenfunktion)
 101
 Mitteilung ausgeben 98, 99
 Mitteilung ausgeben (Tastenfunktion)
 101
 Mitteilung einblenden 203
 Mitteilung sprechen (Scanning) 179
 Mitteilung sprechen (Tastenfunktion)
 101
 Mittelung (Kopfmaus) 187

Modifizierer 117
 Modifizierer anwenden 117, 118
 Modifizierer anwenden (Tastenfunktion)
 101
 Multi-Taste 117
 Multi-Taste aus Bibliothek laden 121
 Multi-Taste bearbeiten 127
 Multi-Taste benutzen 117, 118
 Multi-Taste einfügen 123, 124
 Multi-Taste erstellen 119, 120
 Multi-Taste kopieren 123, 124
 Multi-Taste verknüpfen 125
 Muster 171
 Muster (Scanning) 171

N

Nach der nächsten Eingabe
 (Textfenster automatisch löschen)
 190
 Nachricht (SMS) 246
 Nachricht kopieren (SMS) 246
 Nachricht löschen (SMS) 246
 Nachricht vorlesen (SMS) 246
 Nachrichten (SMS) senden und
 empfangen 239
 Nachrichtendetails (SMS) 246
 Nächste (Taste bearbeiten) 85
 Nächste Seite 23
 Nächstes Wort abwandeln 141
 Nächstes Wort abwandeln
 (Tastenfunktion) 101
 Name (Bild) 90, 92
 Name (Symbol/Bild) 85
 Name (Taste bearbeiten) 83, 86
 Name einer Gruppe / Untergruppe
 bearbeiten (Scan-Editor) 71
 Name und Scan-Modus bearbeiten
 (Scan-Editor) 71
 Navigationsleiste (Kopfmaus) 184
 Navigationstasten 23
 Neigen 180
 Neue Multi-Taste erstellen 119, 120
 Neue Multi-Taste kopieren 125, 126
 Neue Multi-Taste verknüpfen 125, 126
 Neue Nachricht (SMS) 246
 Neue Seite anlegen 42, 44
 Neue Taste erstellen 82
 Neues Profil erstellen 214
 Neues Vokabular erstellen 29
 Normal (Verweilmethode, Kopfmaus)
 186

Normale Visualisierung (Tastendruck) 180
NovaChat-Editor 16
Nur diese Seite (Scan-Editor) 68
Nur Maximieren 180
Nutzung mit externem Telefon 227

O

Oben (Textfensterlayout) 206
Oberste Ebene (Scan-Editor) 69
Online auf neue Version prüfen 264
Optionen des Textfensters 162

P

Parameter wählen (Tastenfunktion) 98, 99
Passwort (Menüsperre) 211
Passwort für aufgezeichnete Daten setzen 234
Passwort für Menüsperre ändern 213
Pause (Kopfmaus) 184
Pause zwischen Wörtern 189
Pausieren-Feld (Kopfmaus) 183
Pfeil (Kopfmaus) 183
Position Textfenster) 206
Profil laden 218
Profil löschen 222
Profil speichern 216
Profil wählen (Tastenfunktion) 101
Profile 214

Q

Querformat 180

R

Rahmen 176
Rahmenbreite 176
Rahmenbreite (Taste bearbeiten) 95, 97
Rahmenfarbe 176
Rahmenfarbe (Taste bearbeiten) 95, 97
Raster anzeigen 208
RealizeLanguage 232
RealizeLanguage, Gerät mit Konto verknüpfen 232
Reihenfolge (Wortvorhersage) 202
Ressource 14

Rückmeldungen / Feedback 228
Rücknahmeoption (Scanning) 175
Ruhezone 185
Ruhezone anzeigen (Kopfmaus) 185
Runter (Tastenfunktion) 98, 99

S

Sättigung 207
Sättigung des Farbverlaufs 207
Satz sprechen 190
Scan-Editor 68
Scangeschwindigkeit 174
Scanmuster 171
Scan-Muster einer Gruppe / Untergruppe bearbeiten (Scan-Editor) 71
Scanning 169
Scanning mit externer Tastatur 171
Scanning stoppen (Tastenfunktion) 101
Scan-Optimierung 174
Scan-Piepton 179
Schreibhilfen 196
Schrift (Taste bearbeiten) 96
Schrift (Taste bearbeiten) 94
Schrift (Textfensterlayout) 205
Schriftart (Textfenster) 205
Schriftfarbe (Taste bearbeiten) 95, 97
Schriftgröße (Textfenster) 205
Seite 14, 19
Seite als Vorlage speichern 46
Seite animieren 53, 54
Seite anzeigen 53, 55
Seite anzeigen (Tastenfunktion) 101, 102
Seite duplizieren 44
Seite ein individuelles Scan-Muster zuweisen 68
Seite erzeugen 42
Seite importieren 60
Seite Kontakte anzeigen (SMS) 246
Seite kopieren 62
Seite Nachrichten anzeigen (SMS) 246
Seite Nachrichtendetails anzeigen (SMS) 246
Seite Unterhaltungen anzeigen (SMS) 246
Seite verknüpfen 53
Seite von Vorlage anlegen 48
Seite zur Startseite machen 63
Seiten drucken 262
Seiten löschen 77

- Seiten-Animationen 207
- Seiteneigenschaften bearbeiten 50
- Seitennavigationsbefehle 55
- Seitenvorgaben 155
- Senden und Empfangen von
 - Textnachrichten (SMS) 235
- Sichern (Vokabulare) 250
- Sichtbar (Taste bearbeiten) 93
- Sichtbar (Taste bearbeiten) 95
- Situationsbild auswählen 57, 58
- Situationsbild verwenden 56
- Situationsbilder 56
- Smartphoneunterstützung auf dem
 - NovaChat / ChatFusion aktivieren 238
- SMS 236
- SMS - Kontakt 246
- SMS - Nachricht 246
- SMS - Nachricht kopieren 246
- SMS - Nachricht löschen 246
- SMS - Nachricht vorlesen 246
- SMS - Nachrichtendetails 246
- SMS - Neue Nachricht 246
- SMS – Seite Kontakte 242
- SMS - Seite Kontakte anzeigen 246
- SMS – Seite Nachrichten 241
- SMS - Seite Nachrichten anzeigen 246
- SMS – Seite Nachrichtendetails 242
- SMS - Seite Nachrichtendetails anzeigen 246
- SMS – Seite Unterhaltungen 240
- SMS - Seite Unterhaltungen anzeigen 246
- SMS - Teilnehmer 246
- SMS - Textfenster als SMS senden 246
- SMS - Unterhaltung 246
- SMS - Unterhaltung löschen 246
- SMS - Vorige 246
- SMS - Weitere 246
- SMS - Zu Kontakten hinzufügen 246
- SMS-Seiten zu Spezialseiten machen 243
- SMS-Symbole im -Textfenster 247
- SMS-Tastenfunktionen, Liste 246
- Sofort (Textfenster automatisch löschen) 190
- Software-Update 263, 264
- Sound aufnehmen 133
- Sound aufnehmen (Tastenfunktion) 102
- Sound wiedergeben 129
- Sound wiedergeben (Tastenfunktion) 102
- Speichern (Textfenster) 162
- Sperren 22
- Spezialseite 63
- Spezialseiten (SMS) 243
- Sprachausgabe 188
- Sprachausgabe aus 190
- Sprachdatenaufzeichnung 232
- Sprachdatenaufzeichnung ein/aus (Tastenfunktion) 102
- Sprache 224
- Sprache ein/aus (Tastenfunktion) 102
- Sprache wechseln 224
- Spracheinstellungen (Scanning) 179
- Sprachsynthese 188
- Sprechen (Tastenfunktion) 102, 162
- Sprechgeschwindigkeit 188
- Springe zu Seite 55
- Springe zu Seite (Tastenfunktion) 102
- Sprungindikator 53, 54
- Sprungindikator (Layout) 207
- Standardprofil laden 220
- Startseite 23
- Startseite (Spezialseite) 63
- Startseite anzeigen 55
- Startseite anzeigen (Tastenfunktion) 102
- Startseite festlegen 63
- Steuerfelder anzeigen (Kopfmaus) 183
- Stimme 188
- Stimme für Ansagen (Scanning) 179
- Stopp 23
- Stopp (Tastenfunktion) 102, 162
- Stylus 13
- Suche nach Updates 264
- Suchen (Bild) 88
- Suchen (Symbol/Bild) 84
- Symbol allen Tasten zuweisen 119, 121
- Symbol auswählen 84
- Symbol drehen 85
- Symbol Eingeschränkte Funktionalität (SMS) 247
- Symbol entfernen 85
- Symbol importieren 85
- Symbol Inkompatible Software (SMS) 247
- Symbol Mehrere neue Textnachricht (SMS) 247
- Symbol Neue Textnachricht (SMS) 247
- Symbol Smartphone nicht verbunden (SMS) 247
- Symbol suchen 84
- Symbole anzeigen 206
- Symbole anzeigen (Textfensterlayout) 206

Symbolname 85
Synthesizer 188
System (Menü) 226

T

Taste 14
Taste ‚Löschen‘ scannen 174
Taste als Ruhezone verwenden (Kopfmaus) 185
Taste aus Bibliothek laden 106
Taste bearbeiten 82
Taste entfernen 116
Taste Kontakt anlegen (SMS) 247
Taste kopieren 108
Taste löschen 116
Taste mehrfach verwenden 106
Taste Senden (SMS) 247
Taste verknüpfen 110
Tasten anzeigen/verbergen 146
Tasten konfigurieren (Scanning) 170
Tasten zuweisen (Scanning) 170
Tastenansage (Scanning) 179
Tastenbreite 114
Tastendruck 180
Tasteneigenschaften – Allgemein 83
Tasteneigenschaften – Funktion 98
Tasteneigenschaften – Layout 94
Tastengröße ändern 114
Tastenhöhe 114
Tastenlayout übertragen 112
Tastenmakro 104
Tastenpiepton 180
Tastenvorgaben 158
Teilen (Textfenster) 162
Teilnehmer (SMS) 246
Text auf Taste speichern 163
Text auf Taste speichern (Tastenfunktion) 102
Textbaustein bearbeiten 194
Textbaustein hinzufügen 193
Textbaustein löschen 195
Textbausteine 192
Textfarbe (Textfensterlayout) 206
Textfenster 14, 19, 162, 181, 208
Textfenster – Text einfügen 166
Textfenster – Text kopieren 166
Textfenster – Text teilen 166
Textfenster (Layout) 205
Textfenster als SMS senden (SMS) 246
Textfenster ausblenden 206
Textfenster automatisch löschen 190
Textfenster laden 165

Textfenster laden (Tastenfunktion) 103
Textfenster löschen 181
Textfenster scannen 174
Textfenster speichern 164
Textfenster speichern (Tastenfunktion) 103, 162
Textfenster, Position 206
Textfenstergröße (Textfensterlayout) 206
Textfenster-Kontextmenü 162
Textfenstermenü 162
Textfenster-Text einfügen (Tastenfunktion) 102
Textfenster-Text freigeben (Tastenfunktion) 102
Textfenster-Text kopieren (Tastenfunktion) 102
Textnachrichten 236
Tippen = Maximieren 181
Tippen = Sprechen 181
Touchscreen-Bildschirm 13
Transparenz (Taste bearbeiten) 94, 97
Transparenz der Markierung 177
Transparenz des Indikators (Kopfmaus) 183

U

Überprüfung erforderlich (Wortvorhersage) 198
Überschreiben anderer Scan-Muster (Scan-Editor) 76
Übersicht Beugungsmöglichkeiten 142
Übertragen – Vokabular zum Computer 256
Übertragen – Vokabular zum/vom NovaChat-Gerät 255
Übertragen – Vokabular zum/von NovaChat-Gerät 254
Übertragen (Vokabulare) 250
Universalpasswort (Menüsperre) 212
Untergruppe hinzufügen (Scan-Editor) 72
Untergruppe löschen (Scan-Editor) 73
Untergruppen automatisch erzeugen (Scan-Editor) 70
Untergruppen automatisch hinzufügen (Scan-Editor) 73
Untergruppen erzeugen (Scan-Editor) 70
Unterhaltung (SMS) 246
Unterhaltung löschen (SMS) 246

V

Verborgene Tasten anzeigen 180
Vergrößern 177
Vergrößerungsfaktor 178
Vertikal (Tastengröße) 114
Vertikale Empfindlichkeit (Kopfmaus)
182
Verweildauer (Kopfmaus) 182
Verweilmethode (Kopfmaus) 185
Verzögerungszeiten 169
Vibrieren 228
Videodatei abspielen (Tastenfunktion)
103
Videodatei einer Taste zuweisen 137
Videodatei wiedergeben 137
Videodateien wiedergeben 137
Visuelle Effekte 176, 183
Visueller Effekt (Tastendruck) 180
Vokabular duplizieren 33
Vokabular eine Geste zuweisen 35
Vokabular erstellen 29
Vokabular öffnen 31
Vokabular umbenennen 34
Vokabular vom Chat-Editor als Datei
exportieren 256
Vokabular vom Chat-Editor auf den
NovaChat übertragen 254
Vokabular vom NovaChat-Gerät zum
Chat-Editor übertragen 255
Vokabular wechseln 31
Vokabulardatei 14
Vokabulardatei in den Chat-Editor
importieren 257
Vokabulare bearbeiten 27
Vokabulare löschen 38
Vokabulare sichern und übertragen
250
Vokabulare sichern und
wiederherstellen über USB 250
Vokabulare sichern und
wiederherstellen überPC 254
Vokabularvorgaben 153
Vorgaben (Seiten) 155
Vorgaben (Tasten) 158
Vorgaben (Vokabular) 153
Vorgespeichertes Vokabular laden 28
Vorige (SMS) 246
Vorige Seite 23
Vorige Seite anzeigen 55

W

Webhook 100
Weitere (SMS) 246
Weitere Optionen (Layout) 208
Wiedergabe einer Audiodatei beenden
137
Wiederherstellen (Vokabulare) 250
WLAN-Download erlauben (Updates)
267
Wort abwandeln 141
Wort abwandeln (Tastenfunktion) 103
Wort aus der Sperrliste löschen
(Wortvorhersage) 199
Wort hinzufügen (Wortvorhersage) 198
Wort löschen 181
Wort löschen (Tastenfunktion) 103,
162
Wort sprechen 190
Wort zum Aussprachlexikon hinzufügen
188
Wort zur Sperrliste hinzufügen
(Wortvorhersage) 199
Wort/Display löschen 23
Wortart zuweisen 141
Wortart zuweisen (Tastenfunktion) 103
Wörter einzeln löschen oder sperren
(Wortvorhersage) 201
Wörter importieren (Wortvorhersage)
199
Wörter überprüfen (Wortvorhersage)
198
Wortform löschen (Tastenfunktion) 103
Wortliste importieren (Wortvorhersage)
200
Wortsuche 22, 138, 210
Wortsuche (Tastenfunktion) 103
Wortsuche, Menü 138
Wortsuche, Tastenfunktion 138
Wortvorhersage 196
Wortvorhersage (Tastenfunktion) 103
Wortvorhersage, Art wählen 197
Wortvorschlagsfelder definieren 202

Z

Zeichen löschen (Tastenfunktion) 103,
162
Zeichen sprechen 190

Zeichenvorhersage (Tastenfunktion)
103
Zeile/Spalte (Scanning) 171
Zeit einstellen 229
Zeit und Datum 229
Zeit/Datum anzeigen (Tastenfunktion)
103
Zeitzone einstellen 229

Zentriert (Situationsbild) 57, 59
Zu Kontakten hinzufügen (SMS) 246
Zum Computer 255
Zum NovaChat-Gerät 254
Zur Spezialseite machen 63
Zurück 22
Zweite Verweildauer (Kopfmaus) 187
Zweites Textfenster 191

