



Bedienungsanleitung

# ABC 45/50/60 2.0 und ABC 45/50/60 2.0 METACOM

Accent mit NuVoice

100036v1

## Hinweise

Accent, AeroSwitch, Empower, Look, NuPoint und NuVoice sind Warenzeichen der Prentke Romich Company.

MINSPEAK®-Wortschatzprogramm ist ein eingetragenes Warenzeichen der Semantic Compaction Systems.

Deutsche Wortstrategie und Quasselkiste sind Warenzeichen der Semantic Compaction Systems.

ABC 45, ABC 50, ABC 60, Wortstrategie 84 und Wortstrategie 144 sind Warenzeichen der Prentke Romich GmbH.

Bedienungsanleitung ABC-Programme 2.0 © Prentke Romich GmbH 2017-2021

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden. Prentke Romich GmbH geht damit keinerlei Verpflichtung ein. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Prentke Romich GmbH sind die vollständige oder teilweise Fotokopie und Reproduktion dieses Handbuches sowie die Übersetzung in andere Sprachen nicht zulässig.

Prentke Romich GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen für diese Unterlagen. Das gilt ohne Einschränkung auch für implizite Garantien auf Marktgängigkeit und Eignung der ABC-Programme oder der hierin gemachten Angaben für einen bestimmten Zweck. Auch übernimmt die Prentke Romich GmbH über die gesetzliche Produkthaftung hinaus keine Haftung für irgendwelche Schäden, die sich aus der Anwendung und Nutzung der ABC-Programme oder der hier gemachten Angaben ergeben.

### Dokumentenversion

100036v1 – 03.09.2021

Bezieht sich auf ABC 45 2.0, ABC 45 Metacom 2.0, ABC 50 2.0, ABC 50 Metacom 2.0, ABC 60 2.0 und ABC 60 Metacom 2.0 für die Software NuVoice in Verbindung mit den Modellen Accent 800, Accent 1000 und Accent 1400, offene und geschlossene Anlage mit Software „NuVoice“.

Hersteller	Der Bevollmächtigte in der EU	Importeur
		
<b>PRC-Salttillo</b> 1022 Heyl Road Wooster, OH 44691 U.S.A. Tel. +1 330 262-1984 Fax +1 330 262-4829 E-Mail info@prentrom.com Web prentrom.com	<b>Prentke Romich GmbH</b> Karthäuserstr. 3 D - 34117 Kassel Germany Tel. +49 (0) 561 7 85 59-0 Fax +49 (0) 561 7 85 59-29 E-Mail info@prentke-romich.de Web prentke-romich.de	<b>Prentke Romich GmbH</b> Karthäuserstr. 3 D - 34117 Kassel Germany Tel. +49 (0) 561 7 85 59-0 Fax +49 (0) 561 7 85 59-29 E-Mail info@prentke-romich.de Web prentke-romich.de

# Inhaltsverzeichnis

ABC-Programme	1
Hinweise .....	2
<b>Inhaltsverzeichnis</b> .....	3
Willkommen bei den ABC-Programmen .....	6
<b>ABC 45</b>	<b>7</b>
Version mit oder ohne Metacom-Symbole.....	7
Die SCHRIFT-SEITE .....	7
Grüne Funktionstasten .....	8
Die ZEICHEN-SEITE.....	9
Wortvorhersage .....	10
Die THEMEN-SEITEN.....	11
Die Seite ÜBER MICH.....	12
Die Seite FRAGEN .....	12
Die Seite ORTE .....	12
Die Seite ESSEN .....	13
Die Seite TRINKEN.....	13
Die Seite SÄTZE .....	13
Die Seite NAMEN .....	14
Die Seite WOHLFÜHLEN.....	14
Die Seite MEDIZIN .....	14
Die Seite ZEIT .....	15
Die Seite FLOSKELN .....	15
Die Seite FAMILIE .....	15
Die Seite KLEIDUNG .....	16
Die Seite PFLEGE.....	16
Die Seite KÖRPER.....	16
Die Seite MEINE SÄTZE 1.....	17
Die Seite MEINE SÄTZE 2.....	17
Die Seite LEUTE.....	17
Die Seite TELEFON .....	18
Die Seite CHAT .....	18
Die Seite FREI 1 .....	18
Die Seite FREI 2.....	19
Die Seite FREI 3.....	19
Die Seite FREI 4.....	19
Eigene Änderungen einfügen .....	20
Seiten ändern über die Toolbox.....	20
Seiten ändern über die SETUP-Taste.....	25
Speichern von spontan erstellten Aussagen mit der Taste „Speichern“ .....	26
Aussprache korrigieren.....	31
Besondere Funktionen des Talkers .....	32
Infrarot-Signale.....	32
Die Seite MEINE LIEDER .....	34
Die Seite HANDY.....	35
Die Seite NOTIZBUCH .....	36
Die Seite FUNKTIONEN.....	38
Eine letzte Anregung: Speicherübertragung durchführen.....	40
Benutzerbereich sichern .....	40
Benutzerbereich laden .....	42
<b>ABC 50</b>	<b>43</b>
Version mit oder ohne Metacom-Symbole.....	43
Die SCHRIFT-SEITE .....	43

Grüne Funktionstasten .....	44
Die ZEICHEN-SEITE.....	45
Wortvorhersage .....	46
Die THEMEN-SEITEN.....	47
Die Seite ÜBER MICH.....	48
Die Seite FRAGEN .....	48
Die Seite ORTE .....	48
Die Seite ESSEN .....	49
Die Seite TRINKEN.....	49
Die Seite SÄTZE.....	49
Die Seite NAMEN .....	50
Die Seite WOHLFÜHLEN.....	50
Die Seite MEDIZIN .....	50
Die Seite ZEIT .....	51
Die Seite FLOSKELN .....	51
Die Seite FAMILIE .....	51
Die Seite KLEIDUNG .....	52
Die Seite PFLEGE.....	52
Die Seite KÖRPER.....	52
Die Seite MEINE SÄTZE 1.....	53
Die Seite MEINE SÄTZE 2.....	53
Die Seite LEUTE.....	53
Die Seite TELEFON .....	54
Die Seite CHAT .....	54
Die Seite FREI 1 .....	54
Die Seite FREI 2 .....	55
Die Seite FREI 3.....	55
Die Seite FREI 4.....	55
Eigene Änderungen einfügen .....	56
Seiten ändern über die Toolbox.....	56
Seiten ändern über die SETUP-Taste.....	61
Speichern von spontan erstellten Aussagen mit der Taste „Speichern“ .....	62
Aussprache korrigieren.....	67
Besondere Funktionen des Talkers .....	68
Infrarot-Signale.....	68
Die Seite MEINE LIEDER.....	70
Die Seite HANDY.....	71
Die Seite TABLET .....	72
Die Seite MAUS.....	73
Die Seite PC FUNKTIONEN.....	75
Die Seite NOTIZBUCH .....	76
Die Seite FUNKTIONEN.....	78
Eine letzte Anregung: Speicherübertragung durchführen.....	80
Benutzerbereich sichern .....	80
Benutzerbereich laden .....	82
<b>ABC 60 .....</b>	<b>83</b>
Version mit oder ohne Metacom-Symbole.....	83
Die SCHRIFT-SEITE .....	83
Grüne Funktionstasten .....	84
Die ZEICHEN-SEITE.....	85
Wortvorhersage .....	86
Die THEMEN-SEITEN.....	87
Die Seite ÜBER MICH.....	88
Die Seite FRAGEN .....	88
Die Seite ORTE .....	88

Die Seite ESSEN .....	89
Die Seite TRINKEN.....	89
Die Seite SÄTZE .....	89
Die Seite NAMEN .....	90
Die Seite WOHLFÜHLEN.....	90
Die Seite MEDIZIN .....	90
Die Seite ZEIT .....	91
Die Seite FLOSKELN .....	91
Die Seite FAMILIE .....	91
Die Seite KLEIDUNG .....	92
Die Seite PFLEGE.....	92
Die Seite KÖRPER.....	92
Die Seite MEINE SÄTZE 1.....	93
Die Seite MEINE SÄTZE 2.....	93
Die Seite LEUTE.....	93
Die Seite TELEFON .....	94
Die Seite CHAT .....	94
Die Seite WICHTIG 1 .....	94
Die Seite WICHTIG 2 .....	95
Die Seite FREI 1 .....	95
Die Seite FREI 2 .....	95
Die Seite FREI 3.....	96
Die Seite FREI 4.....	96
Eigene Änderungen einfügen .....	97
Seiten ändern über die Toolbox.....	97
Seiten ändern über die SETUP-Taste.....	101
Speichern von spontan erstellten Aussagen mit der Taste „Speichern“ .....	102
Aussprache korrigieren.....	107
Besondere Funktionen des Talkers .....	108
Infrarot-Signale .....	108
Die Seite MEINE LIEDER .....	110
Die Seite HANDY .....	111
Die Seite TABLET .....	113
Die Seite MAUS.....	114
Die Seite PC FUNKTIONEN.....	116
Die Seite NOTIZBUCH .....	117
Die Seite FUNKTIONEN.....	119
Eine letzte Anregung: Speicherübertragung durchführen.....	121
Benutzerbereich sichern .....	121
Benutzerbereich laden .....	123

## Willkommen bei den ABC-Programmen

Die ABC-Programme bilden eine Gruppe von schriftbasierten Wortschatzprogrammen für die Accent-Kommunikationshilfen. Sie kombinieren die Vorzüge einer Schrifteingabe, die von einer leistungsfähigen Wortvorhersage wirkungsvoll unterstützt wird, mit der Möglichkeit, häufig benötigte Wörter und Aussagen im Ganzen abzuspeichern, damit sie schnell zur Verfügung stehen. „ABC 45“, „ABC 50“ und „ABC60“ sind somit flexible Kommunikationsprogramme, durch die der Talker in Verbindung mit seinen speziellen Optionen wie z.B. Umfeldkontrolle, Notizbuchfunktionen oder Computersteuerung zu einem effektiven Kommunikationssystem wird.

In dieser Einführung stellen wir Ihnen die Programme „ABC 45“, „ABC 50“ und „ABC 60“ vor und geben erste Hinweise, wie Sie individuelle Veränderungen vornehmen können.

An verschiedenen Stellen verweisen wir dazu auf das **Software-Manual** und auf das **Kleine Handbuch**, die beide zum Lieferumfang des Talkers gehören.

In beiden Handbüchern sind auch Funktionen beschrieben, die zwar **nicht** in den ABC-Programmen zum Tragen kommen, aber zu anderen Anwendungsprogrammen für Talker gehören und deshalb dargestellt werden müssen.

Zu den Informationen, die für die ABC-Programme **keine Relevanz** haben, gehören u. a. die Ausführungen zu „Kernvokabular“, „Ikonen“, „Dialekten“ und „Dias“. Diese Kapitel können Sie außer Acht lassen.

# ABC 45

## Version mit oder ohne Metacom-Symbole

Das Wortschatzprogramm „ABC 45“ gibt es in 2 Versionen, eines mit und eines ohne Metacom-Symbole. Die Version ohne Metacom-Symbole nutzt die mitgelieferten PRD-Symbole zur Kennzeichnung von Funktionstasten und Aussagen, die Version mit Metacom nutzt Metacom-Symbole.



ABC 45 ohne Metacom-Symbole

ABC 45 mit Metacom-Symbolen

Die im Folgenden gemachten Angaben gelten für beiden Versionen, auch wenn die Grafiken die Version ABC 45 mit Metacom-Symbolen zeigen.

## Die SCHRIFT-SEITE

Schalten Sie den Talker mit der Ein/Aus-Taste ein.

Nach dem Startvorgang erscheint folgendes Bild im Display:



Die oberste Zeile, die im Augenblick noch leer ist, heißt Textfenster. Hier erscheinen im Folgenden die Buchstaben und Wörter, die Sie schreiben.

Die Buchstaben auf der SCHRIFT-SEITE sind in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. Die Vokale (Selbstlaute) A, E, I, O und U stehen in der linken Spalte untereinander.

In den grauen Feldern erscheinen die Vorschläge der Wortvorhersage, sobald Sie zu schreiben beginnen. Tippen Sie auf ein Feld, um einen Vorschlag zu übernehmen.

Sie können sofort mit dem Schreiben beginnen.


Tippen Sie z. B. nacheinander die einzelnen Buchstaben h a l l o und am Ende die Taste <leer> ganz oben rechts.

(Stören Sie sich bitte nicht daran, dass der Talker die einzelnen Buchstaben nicht laut ausspricht. Das liegt daran, dass die Sprache ausgeschaltet ist. Wie man die Sprachausgabe ein- und ausschalten kann, erfahren Sie bei den Erläuterungen zur THEMEN-SEITE weiter hinten in dieser Einführung.)

Im Textfenster in der oberen Zeile erscheint das Wort „hallo“.  
Tippen Sie auf das angezeigte Wort „hallo“, und der Talker spricht das ganze Wort.

## Grüne Funktionstasten


Auf der SCHRIFT-SEITE befinden sich auch einige grün unterlegte Tasten mit Funktionen, die beim Schreiben wichtig sind:

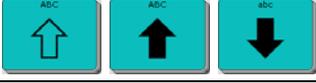Version mit META-COM-Symbolen	Version ohne META-COM-Symbole	
		Zeichen löschen
		Wort löschen
		Inhalt des Textfensters löschen
		Wechsel zwischen Groß-, permanent Groß- und Kleinschreibung
		Wechsel zur THEMEN-SEITE
		Wechsel zur ZEICHEN-SEITE
		Wechsel zur CHAT-SEITE

## Die ZEICHEN-SEITE

Drücken Sie auf der SCHRIFT-SEITE die Taste .

Die Anzeige im Display wechselt und Sie sehen nun die ZEICHEN-SEITE:

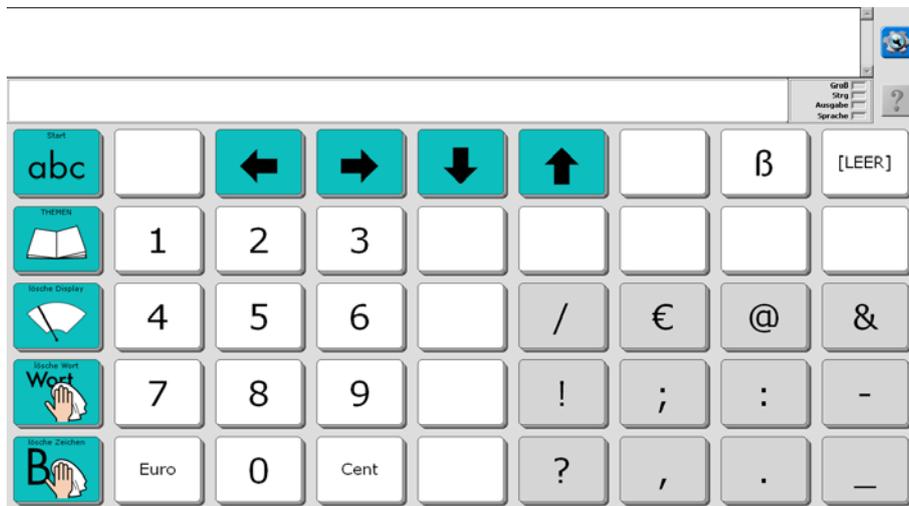

Die ZEICHEN-SEITE bleibt geöffnet, bis Sie sie manuell wieder schließen:

Drücken Sie die Taste , um wieder auf die Startseite zu gelangen.

Drücken Sie die Taste , um auf die THEMEN-SEITE zu gelangen.

## Wortvorhersage


Der Talker verfügt über eine leistungsfähige Wortvorhersage, bestehend aus einer Wortvervollständigung des gerade eingegebenen Wortes und einer Vorhersage des nächsten Wortes.

Beim Schreiben erscheinen auf den grauen Tasten Wortvorschläge, die Sie durch direktes Antippen auswählen können, um den Schreibprozess abzukürzen.



Sie können neue Wörter ganz einfach über die Taste „Wortvorhersage hinzufügen“ (Seite FUNKTIONEN) zum Wortvorhersagelexikon hinzufügen (siehe Seite 39).

Ein- und Ausschalten sowie anpassen können Sie die Wortvorhersage über die Toolbox, Menü Wortvorhersage.

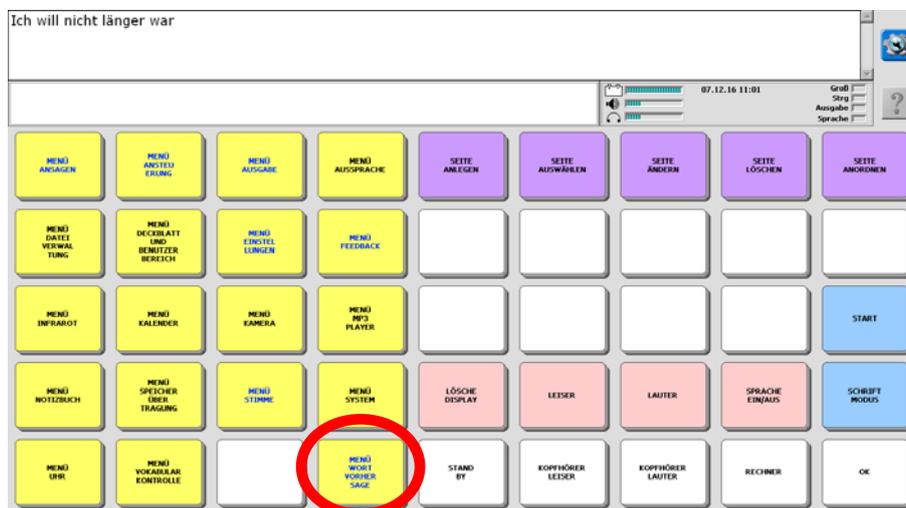

## Die THEMEN-SEITEN

Zusätzlich zu den Möglichkeiten der Schrifteingabe bietet der Talker auch die Funktion, Wörter und Sätze, die man häufig benötigt, als Ganzes abzuspeichern, damit man sie nicht jedes Mal wieder schreiben muss.



Drücken Sie die Taste Themen  auf der SCHRIFT-SEITE.

Die Anzeige im Display wechselt und Sie sehen die THEMEN-SEITE:



Die hell hinterlegten Tasten öffnen Seiten zu verschiedenen Themenbereichen, die Sie individuell verändern können (weiter hinten in dieser Einführung wird die entsprechende Vorgehensweise erläutert). Auf den Tasten steht jeweils der Name der damit zu öffnenden Seite.

Die grau umrandeten Tasten ganz unten bieten Zugang zu speziellen Seiten z. B. zur Steuerung eines Haushaltsgerätes, der Liedersammlung, der Steuerung eines Mobilgerätes (Handy, Smartphone, Tablet), zu den Notizbüchern und zu wichtigen Gerätefunktionen.

Die grau hinterlegten Aussagen in der rechten Spalte „ja“, „nein“, „doch“, „bitte“ und „danke“ in der rechten Spalte sind auf allen Themenseiten zu finden. **Bei allen grau hinterlegten Tasten gilt: Die Tasten dienen dem Kommentieren, der jeweilige Inhalt wird nicht im Textfenster angezeigt!**



Wechsel zurück zur SCHRIFT-SEITE



Zurück zur Themen-Auswahlseite



Löscht den gesamten Inhalt des Textfensters.



Löscht das letzte Wort im Textfenster.



Löscht den zuletzt eingegebenen Buchstaben im Textfenster.

Im Folgenden sind alle Themenseiten abgebildet.

## Die Seite ÜBER MICH



Start abc	Ich heiße 	Ich wohne in 	Alter 	Telefonnummer 	E-Mail Adresse @			ja 
THEMEN 								nein 
lösche Display 								doch 
lösche Wort Wort 								bitte 
lösche Zeichen B 								danke 

## Die Seite FRAGEN



Start abc	Was ist das? 	Was gibt es Neues? 						ja 
THEMEN 	Wann kommst Du? 	Was gestern? 	Wie geht es dir? 					nein 
lösche Display 	Wie viel? 							doch 
lösche Wort Wort 								bitte 
lösche Zeichen B 								danke 

## Die Seite ORTE



Start abc	Apotheke 	Bäcker 	Bahnhof 	Bank 	Geschäft 			ja 
THEMEN 	Kino 	Kiosk 	Kirche 	Markt 	Metzger 			nein 
lösche Display 	Park 	Post 	Supermarkt 	Tankstelle 				doch 
lösche Wort Wort 								bitte 
lösche Zeichen B 								danke 

## Die Seite ESSEN



Start abc								ja ✓
THEMEN								nein ✗
lösche Display								doch 👤
lösche Wort Wort								bitte 👤👤
lösche Zeichen B	Hunger 👤	Wann? 🕒	Was? 🍴	etwas anderes 🍏✂️	Das reicht! 🍷	schlecht 👤	darf nicht 🚫	danke 👤👤

## Die Seite TRINKEN



Start abc								ja ✓
THEMEN								nein ✗
lösche Display								doch 👤
lösche Wort Wort								bitte 👤👤
lösche Zeichen B	Durst 👤	Ich brauche Hilfe. 👤👤	Was? 👤	etwas anderes 🍏✂️	Das reicht! 🍷	schlecht 👤	darf nicht 🚫	danke 👤👤

## Die Seite SÄTZE



Start abc								ja ✓
THEMEN								nein ✗
lösche Display								doch 👤
lösche Wort Wort								bitte 👤👤
lösche Zeichen B								danke 👤👤

## Die Seite NAMEN



Start abc								ja ✓
THEMEN 								nein ✗
lösche Display 								doch 
lösche Wort Wort 								bitte 
lösche Zeichen B 	Wie heißt du? 	Wie heißen Sie? 						danke 

## Die Seite WOHLFÜHLEN



Start abc								ja ✓
THEMEN 								nein ✗
lösche Display 								doch 
lösche Wort Wort 								bitte 
lösche Zeichen B 	langsam 	So ist es gut. 	nicht richtig 					danke 

## Die Seite MEDIZIN



Start abc								ja ✓
THEMEN 								nein ✗
lösche Display 								doch 
lösche Wort Wort 								bitte 
lösche Zeichen B 	neues Rezept 	Ich brauche Hilfe. 	Arzt sprechen + 	verstanden 	nicht verstanden 	Wann wiederssehen? 		danke 

## Die Seite ZEIT



Mit der Tasche geben Sie das aktuelle Datum aus.



Start abc	Montag Mo	Dienstag Di	Mittwoch Mi	Donnerstag Do	Freitag Fr	Samstag Sa	Sonntag So	ja ✓
THEMEN 	1	2	3	4	5	6	[LEER]	nein ✗
lösche Display 	7	8	9	10	11	12	Uhr 	doch 
lösche Wort Wort 	früh 	spät 	gestern 	heute 	morgen 	nach 	Minute 	bitte 
lösche Zeichen B 	Datum 23 ober	Tag 	Woche 	Wochenende 	Monat 	Jahr 	Stunde 	danke 

## Die Seite FLOSKELN



Start abc	Hallo! 	Guten Tag! 	Tschüß! 	Auf Wiedersehen! 				ja ✓
THEMEN 	Glückwunsch! 	Alles Gute! 	Entschuldigung! 	Freue Weihnachten! 				nein ✗
lösche Display 						Mein! 	Gruß Gott! 	doch 
lösche Wort Wort 								bitte 
lösche Zeichen B 								danke 

## Die Seite FAMILIE



Start abc	Enkel 	Sohn 	Vater 	Opa 	Bruder 	Schwigersohn		ja ✓
THEMEN 	Enkelin 	Tochter 	Mutter 	Oma 	Schwester 	Schwiegertochter		nein ✗
lösche Display 								doch 
lösche Wort Wort 								bitte 
lösche Zeichen B 								danke 

## Die Seite KLEIDUNG



Start abc								ja ✓
THEMEN								nein ✗
lösche Display								doch 👤
lösche Wort Wort								bitte 👤👤
lösche Zeichen B	Aussehen? 👤?	Wie Wetter? ☀️☁️?	Anschaut 🪞					danke 👤👤

## Die Seite PFLEGE



Start abc	Zähne putzen 🪥	waschen 🧼	duschen 🚿	baden 🛀				ja ✓
THEMEN								nein ✗
lösche Display								doch 👤
lösche Wort Wort								bitte 👤👤
lösche Zeichen B	Türe zu 🚪	brauche Hilfe 🧑🧎	Toilette 🚽					danke 👤👤

## Die Seite KÖRPER



Start abc								ja ✓
THEMEN								nein ✗
lösche Display								doch 👤
lösche Wort Wort								bitte 👤👤
lösche Zeichen B	Ich möchte liegen 🛌	Ich brauche Hilfe 🧑🧎	Juckent 🖐️	Schmerzen 👤👤	Überkeit 🤢			danke 👤👤

## Die Seite MEINE SÄTZE 1



Start abc								speichern	ja ✓
THEMEN 									nein ✗
lösche Display 									doch 
lösche Wort Wort 									bitte 
lösche Zeichen B 									danke 

## Die Seite MEINE SÄTZE 2



Start abc								speichern	ja ✓
THEMEN 									nein ✗
lösche Display 									doch 
lösche Wort Wort 									bitte 
lösche Zeichen B 									danke 

## Die Seite LEUTE



Start abc	Besucher 	Nachbar 							ja ✓
THEMEN 	Frau 	Mann 							nein ✗
lösche Display 	Mädchen 	Junge 	Kind 						doch 
lösche Wort Wort 	Krankenschwester 	Pfleger 							bitte 
lösche Zeichen B 									danke 

## Die Seite TELEFON



Start abc	Hallo!	Auf Wiederhören!						ja ✓
THEMEN 	Hier spricht	Sprach Computer	Bitte Ja/Nein-Fragen stellen	Moment bitte, ich schreibe		Ihre Handy Nummer	Ihre Tel. Nummer	nein ✗
lösche Display 	Bitte wiederholen Sie	Bitte erklären	Ich habe nicht verstanden	Ich habe verstanden		Meine Handy Nummer	Meine Tel. Nummer	doch 
lösche Wort Wort 	Wie ist Ihr Name?							bitte 
lösche Zeichen B 	Bitte später wieder anrufen							danke 

## Die Seite CHAT



Start abc	Ja/Nein Frage	ich antworte gerade						ja ✓
THEMEN 								nein ✗
lösche Display 	ich verstehe alles	bitte die Frage wiederholen						doch 
lösche Wort Wort 								bitte 
lösche Zeichen B 								danke 

## Die Seite FREI 1



Start abc								ja ✓
THEMEN 								nein ✗
lösche Display 								doch 
lösche Wort Wort 								bitte 
lösche Zeichen B 								danke 

## Die Seite FREI 2

FREI  
**2**

Start abc								ja ✓
THEMEN 								nein ✗
lösche Display 								doch 
lösche Wort Wort 								bitte 
lösche Zeichen B 								danke 

## Die Seite FREI 3

FREI  
**3**

Start abc								ja ✓
THEMEN 								nein ✗
lösche Display 								doch 
lösche Wort Wort 								bitte 
lösche Zeichen B 								danke 

## Die Seite FREI 4

FREI  
**4**

Start abc								ja ✓
THEMEN 								nein ✗
lösche Display 								doch 
lösche Wort Wort 								bitte 
lösche Zeichen B 								danke 

## Eigene Änderungen einfügen

Bevor wir zu den Sonderfunktionen in der unteren Zeile der THEMEN-SEITE kommen, erfahren Sie, wie Sie eigene Änderungen in das Programm „ABC 45“ einfügen können.


### Seiten ändern über die Toolbox

Das Programm „ABC 45“ ist aus einzelnen Seiten zusammengesetzt. Um Änderungen vorzunehmen, werden Sie hauptsächlich die lila Tasten in der oberen Reihe der Toolbox benötigen.


Wie Sie Seiten ändern können, wird im Folgenden Schritt für Schritt am Beispiel der Seite ÜBER MICH erläutert.

Öffnen Sie die Toolbox.


Drücken Sie die Taste SEITE ÄNDERN

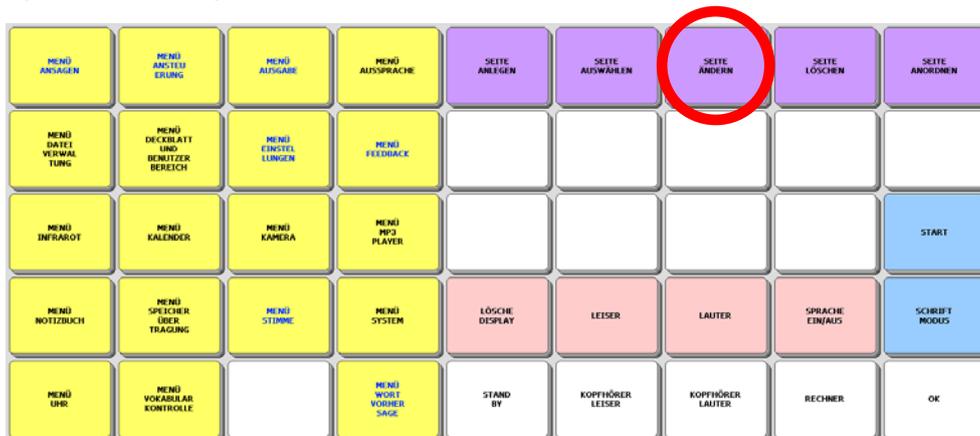

Wählen Sie die zu ändernde Seite aus: ÜBER MICH

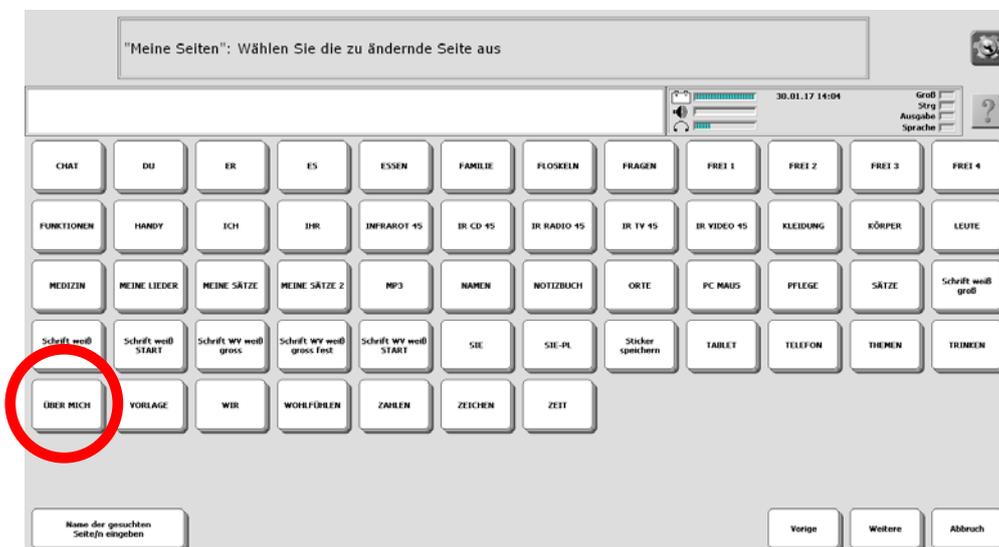


Im Display erscheint die Seite ÜBER MICH. Oben links im Textfenster steht die Aufforderung: „Taste auswählen“.

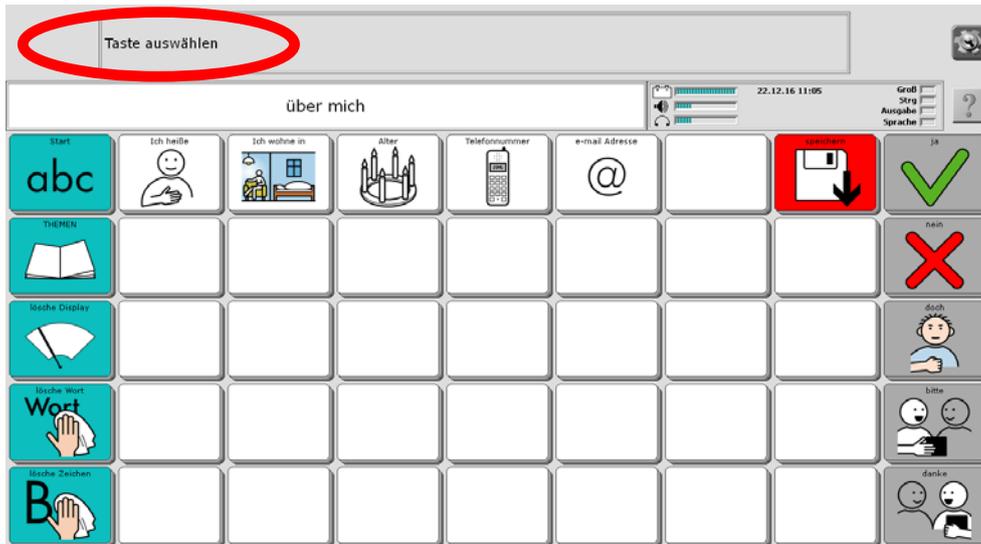


Ändern Sie die für Ihren Namen, Adresse, Alter und Telefonnummer vorbereiteten Tasten.

Wählen Sie die Taste „Ich heiße“. Sie sehen folgende Anzeige:

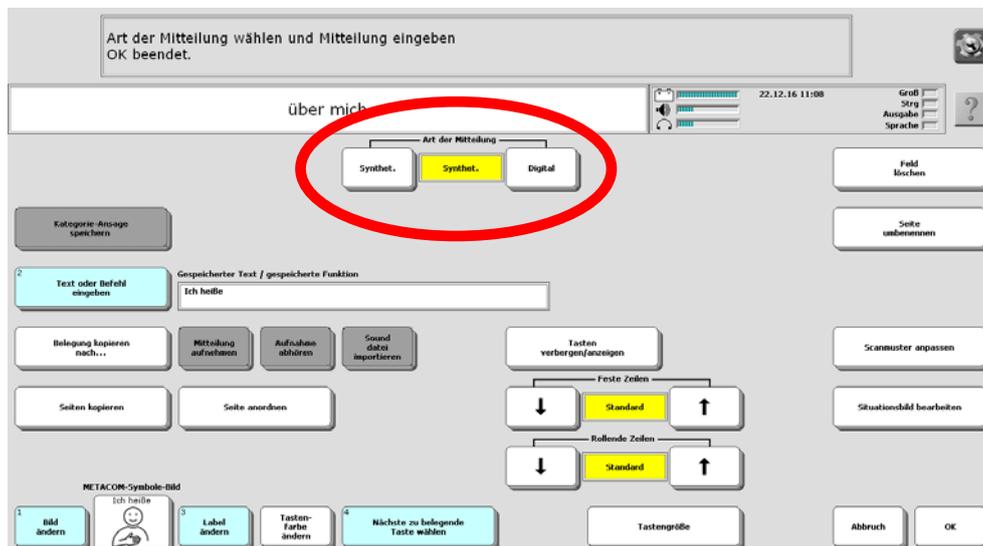


Im gelben Feld oben in der Mitte steht für „Art der Mitteilung = synthet.“. Das bedeutet, dass die Mitteilung mit der Computerstimme des Talkers gesprochen wird.

Darunter sehen Sie:

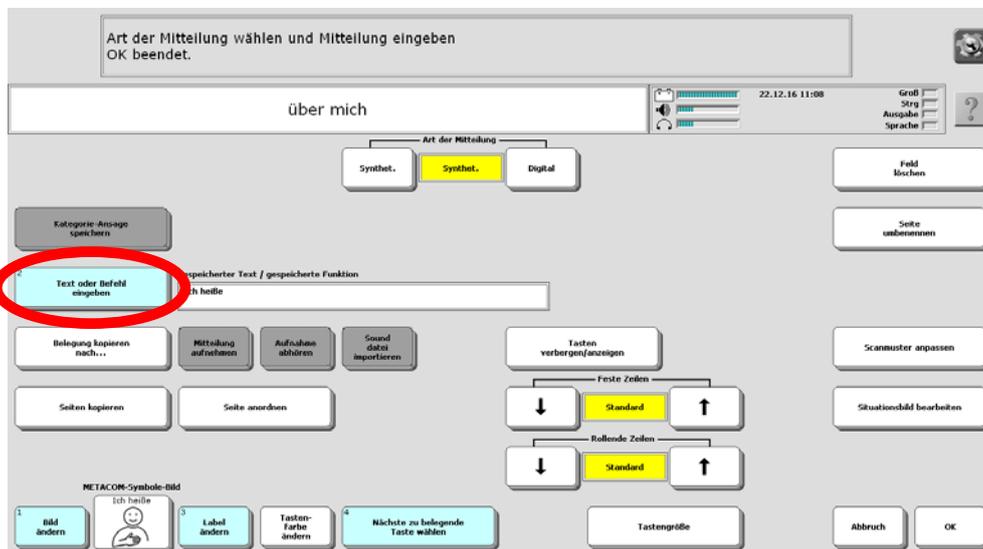


Drücken Sie <Text oder Befehl eingeben>. Mit Hilfe der Buchstabentastatur, die dann erscheint, können Sie Ihren Namen ergänzen.

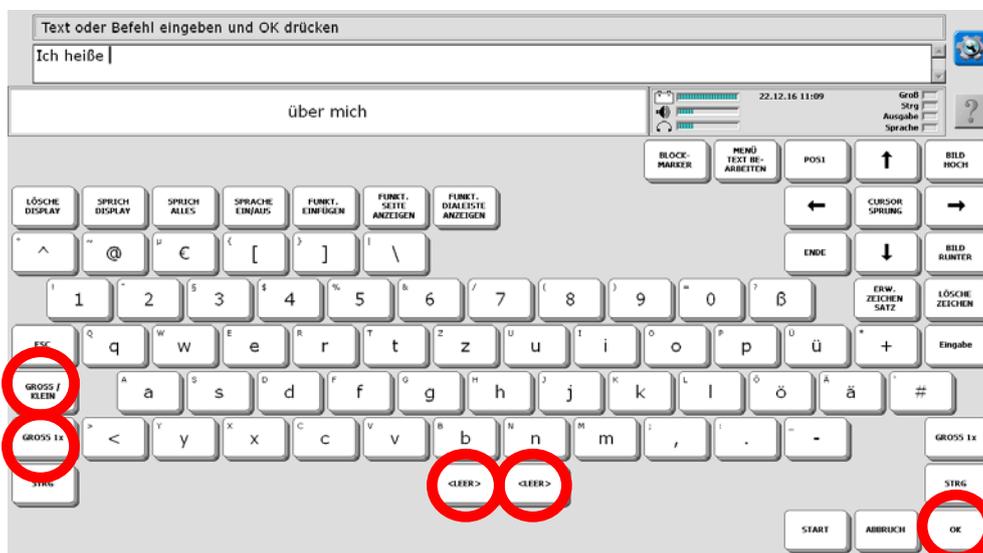


Mit den beiden Tasten unten links können Sie die Groß- und Kleinschreibung verändern. Nach Ihrem Namen machen Sie bitte ein Leerzeichen (unten Mitte). Beenden Sie die Eingabe mit <OK> (unten rechts).

Die Anzeige im Display springt zurück und Sie sehen den ergänzten Text:

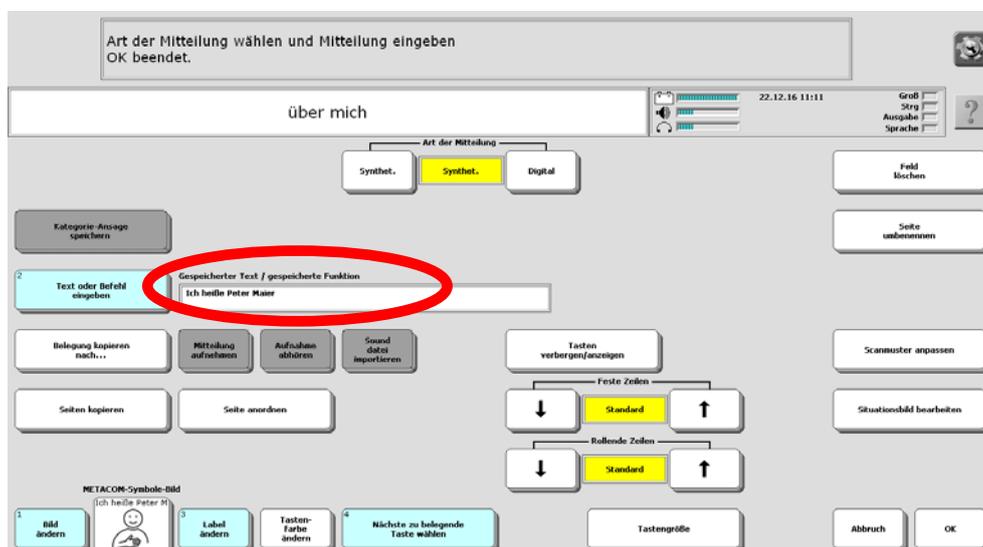


Um auch die Angaben auf den Tasten <Ich wohne in>, <Alter>, <Telefonnummer> und <E-Mail-Adresse> zu ergänzen, drücken Sie das Feld <Nächste zu belegende Taste wählen> wählen Sie die gewünschte Taste und verfahren Sie wie im vorangegangenen Beispiel.

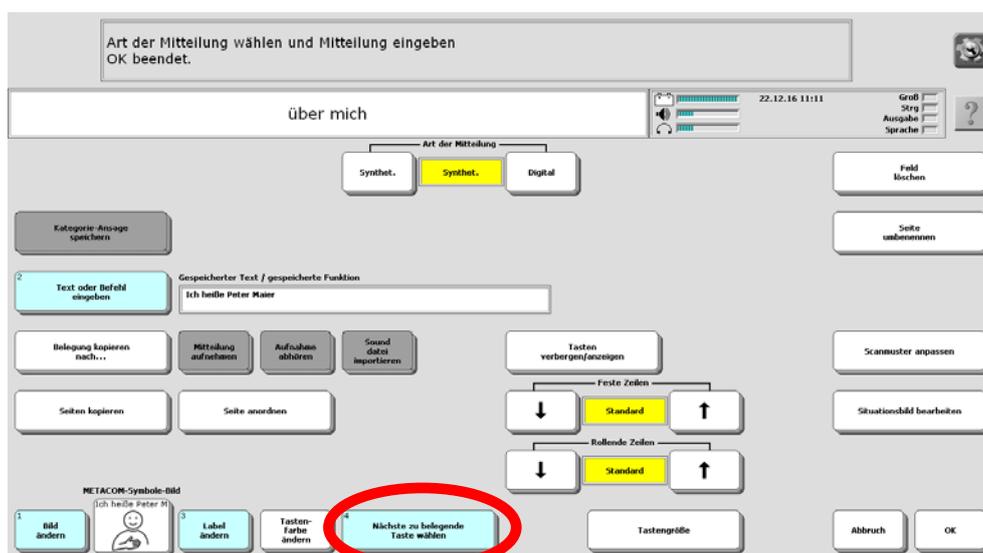


Felder, auf denen noch nichts gespeichert ist, können Sie selbst belegen, indem Sie einen eigenen Text eingeben.

Wenn der Text zu lang ist, um auf der Taste angezeigt zu werden, wählen Sie die Funktion <Label ändern> und geben dort nur ein Stichwort als Merkhilfe ein. Wenn Sie auf der Taste ein Bild hinzufügen möchten, gelangen Sie mit der Funktion <Bild ändern> in das Bildarchiv des Talkers. Standardmäßig enthält der Talker im Modus „ABC-Programme“ keine Bilder. Um Bilder zu verwenden:

1. Erwerben Sie einen der optional erhältlichen Symbolsätze METACOM oder PCS.
2. Importieren Sie eigene Bilder in den Talker (siehe Handbuch).

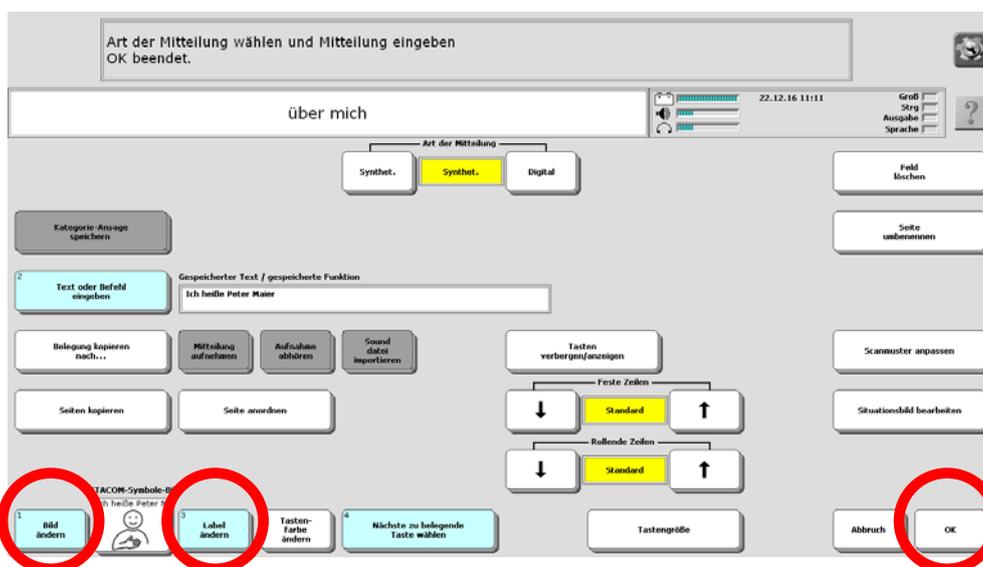

Nachdem Sie Ihre persönlichen Änderungen eingefügt haben, beenden Sie das Menü mit <OK> (unten rechts). Es erscheint wieder die Toolbox.

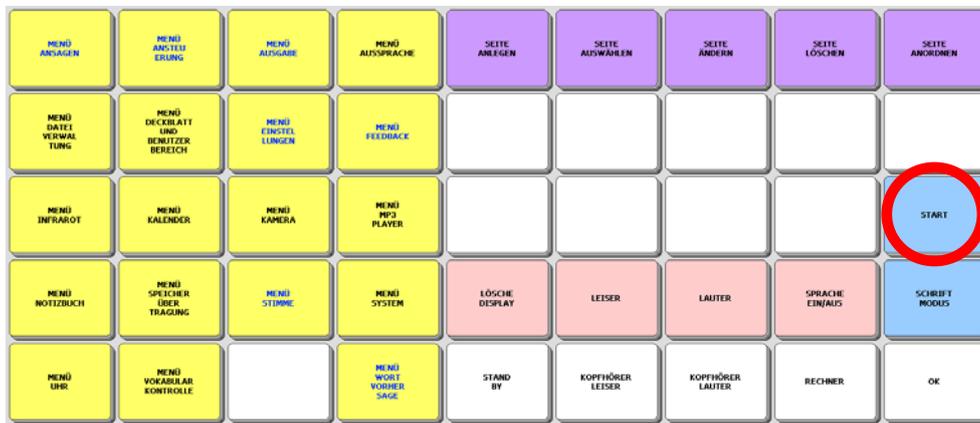

Die hellblaue Taste <START> bringt Sie zurück zur Ausgangsseite SCHRIFT des Programms „ABC 45“.

Ausführliche Informationen zum Thema „Seiten“ entnehmen Sie bitte dem Heft „Das kleine Handbuch“, das Sie mit dem Talker erhalten haben, oder der Bedienungsanleitung im Kapitel „Das persönliche Deckblatt / Seiten“.

## Seiten ändern über die SETUP-Taste

Die Setup-Taste ermöglicht ein schnelles und intuitives Bearbeiten von Tasten ohne den „Umweg“ über die Toolbox.


1. Öffnen Sie die Seite, auf der Sie eine Aussage speichern oder bearbeiten wollen




2. Tippen Sie auf die Taste . Das Menü TOOLS wird angezeigt:



3. Tippen Sie auf die Taste .
4. Wählen Sie die zu bearbeitende Taste aus:

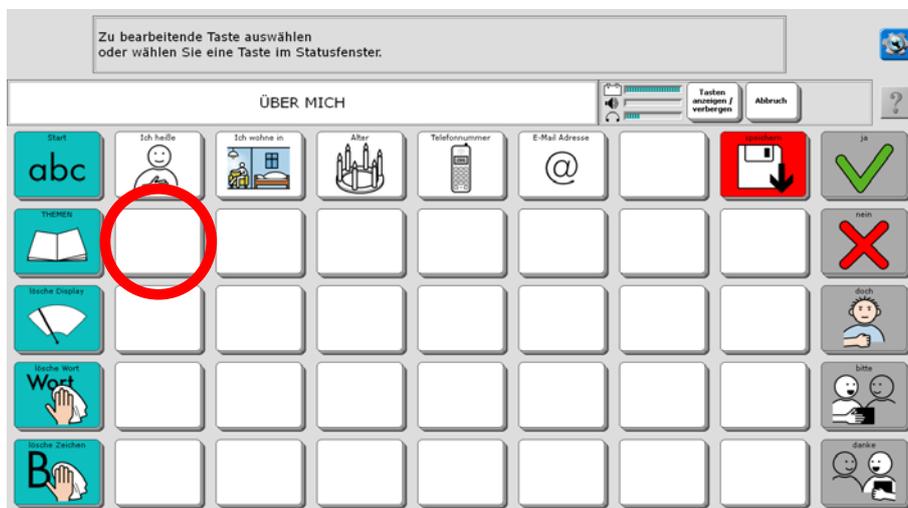

5. Geben Sie die Aussage ein. Wenn gewünscht, wählen Sie ein passendes Symbol.

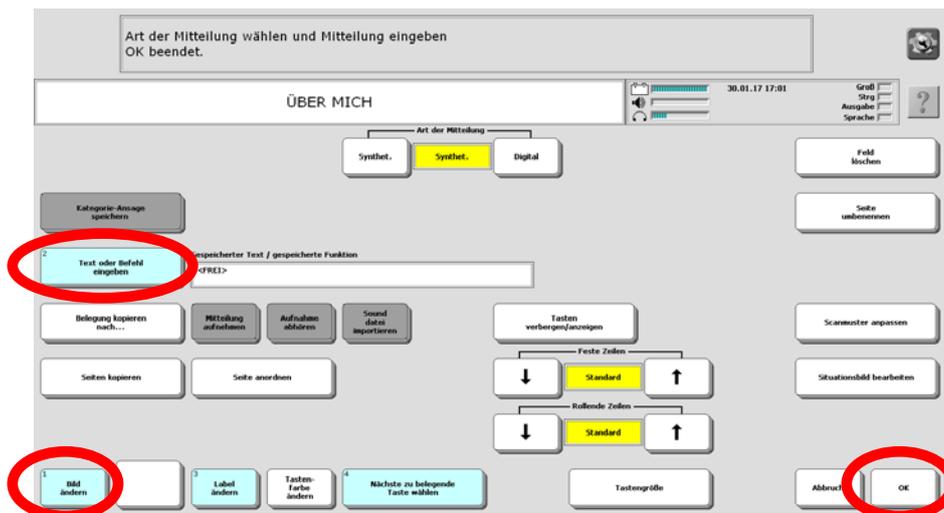

6. Drücken Sie zum Abschluss auf „OK“:

## Speichern von spontan erstellten Aussagen mit der Taste „Speichern“



Alle Themenseiten enthalten rechts oben eine Taste „Speichern“, mit der Sie den aktuell im Textfenster befindlichen Text auf einer Taste der aktuellen Seite speichern können.


Haben Sie z. B. eine Aussage formuliert, die Sie gerne aufheben möchten, weil Sie sie öfter verwenden wollen, können Sie sie mit Hilfe der Taste „Speichern“ bequem auf einer Seite Ihrer Wahl dauerhaft speichern.

Bis auf die Seiten „Meine Sätze 1“ und „Meine Sätze 2“ ist die Taste „Speichern“ zunächst ausgeblendet.


### Taste „Speichern“ sichtbar machen über die Toolbox

Öffnen Sie die Toolbox.


Drücken Sie die Taste SEITE ÄNDERN

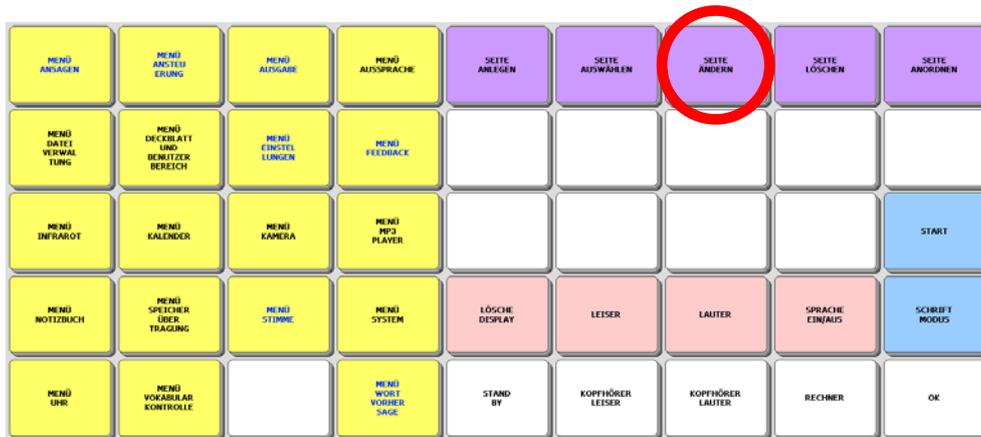


Wählen Sie die Seite aus, auf der Sie die Taste „Speichern“ sichtbar machen wollen, z. B. ÜBER MICH.

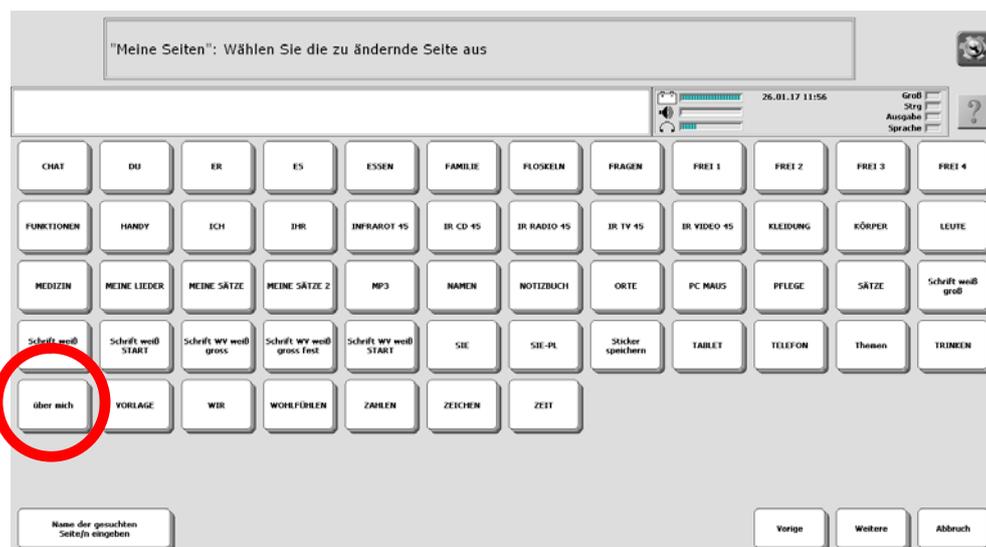


Im Display erscheint die Seite ÜBER MICH. Oben links im Textfenster steht die Aufforderung: „Taste auswählen“. Tippen Sie auf die Taste „Speichern“.

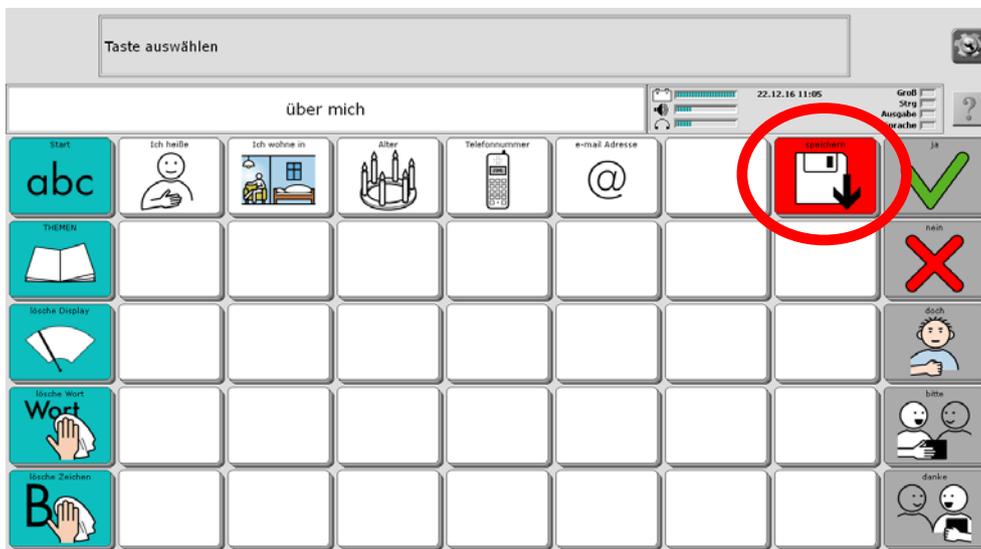


Wählen Sie die Option „Tasten verbergen/anzeigen“.

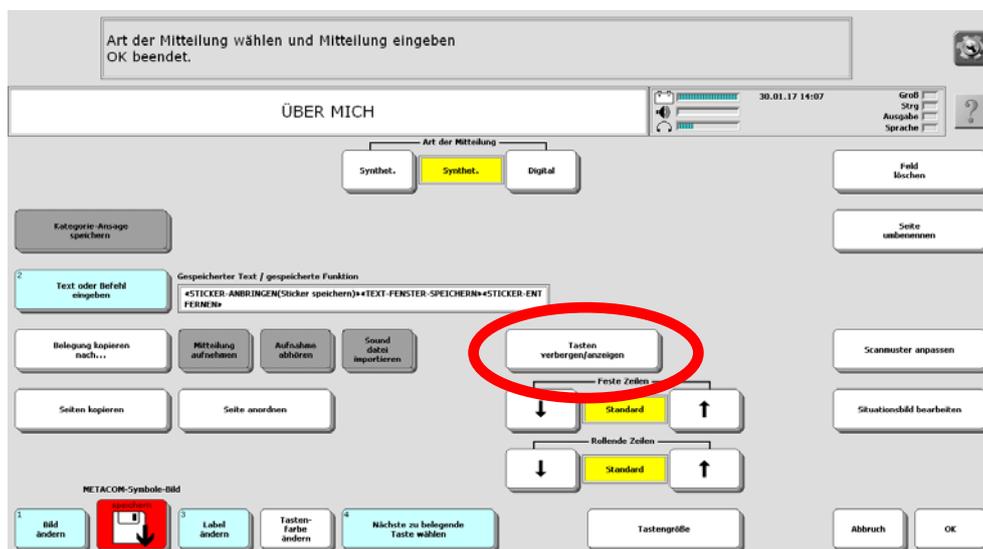


Die Seite wird angezeigt. Ausgeblendete Felder werden ausgegraut angezeigt.

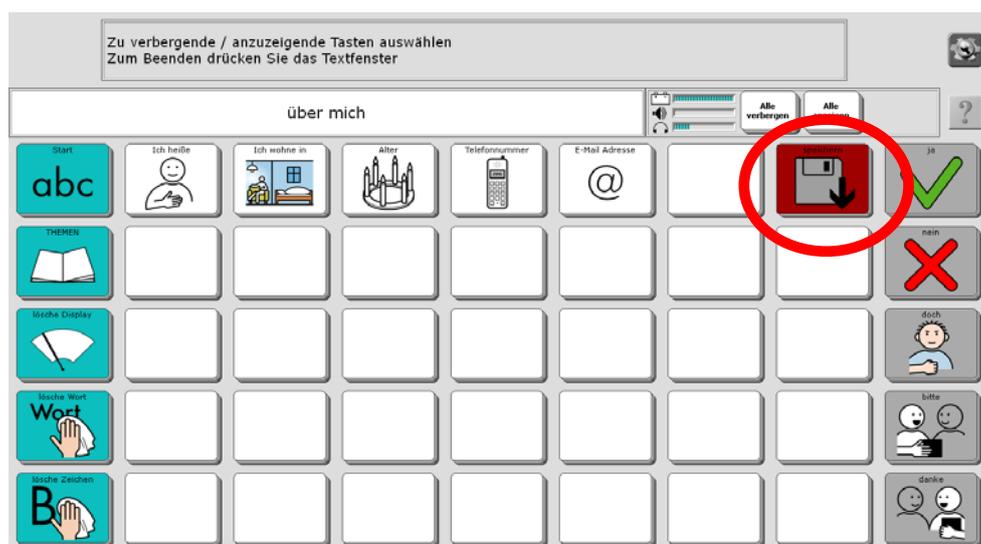


Tippen Sie auf die Taste „Speichern“ . Die Taste wird wieder „normal“ angezeigt.

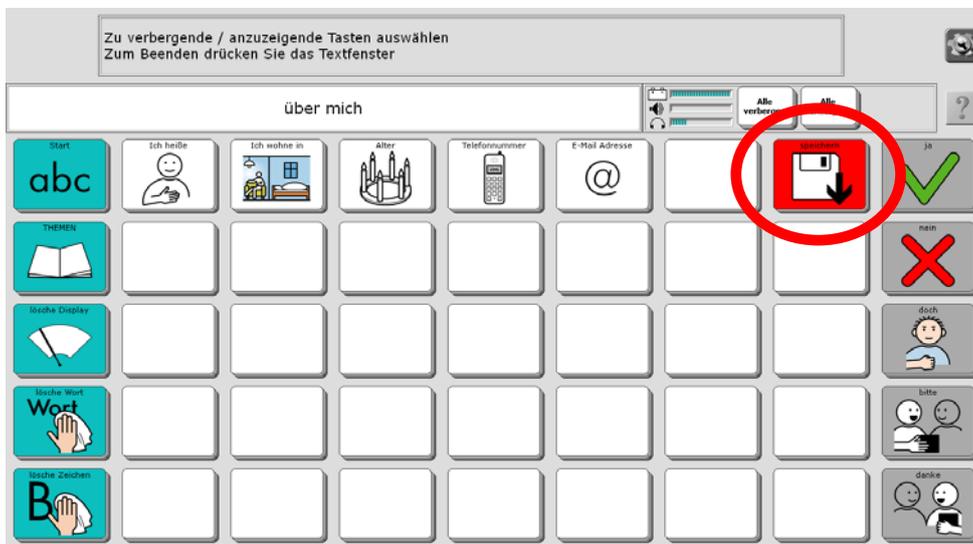


Tippen Sie oben in den grauen Bereich des Textfensters, um den Modus „Tasten verbergen / anzeigen“ zu beenden.

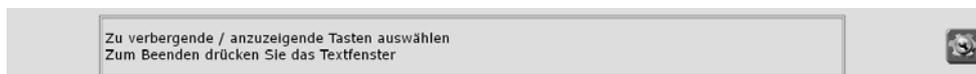

Tippen Sie auf „OK“, um das Bearbeiten der Seite zu beenden.

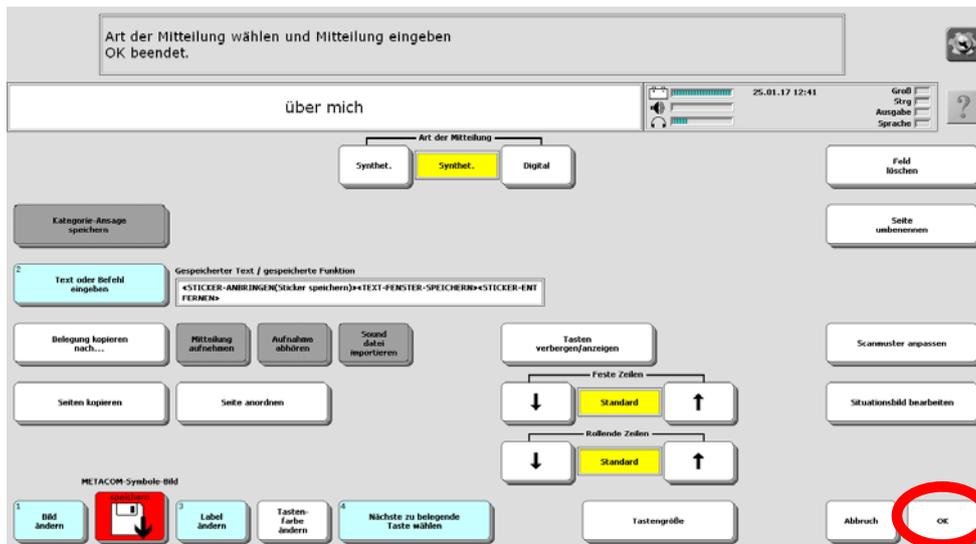

Schließen Sie die Toolbox durch Tippen auf „OK“.  
Die Taste „Speichern“ ist nun auf der Seite ÜBER MICH sichtbar und kann benutzt werden:

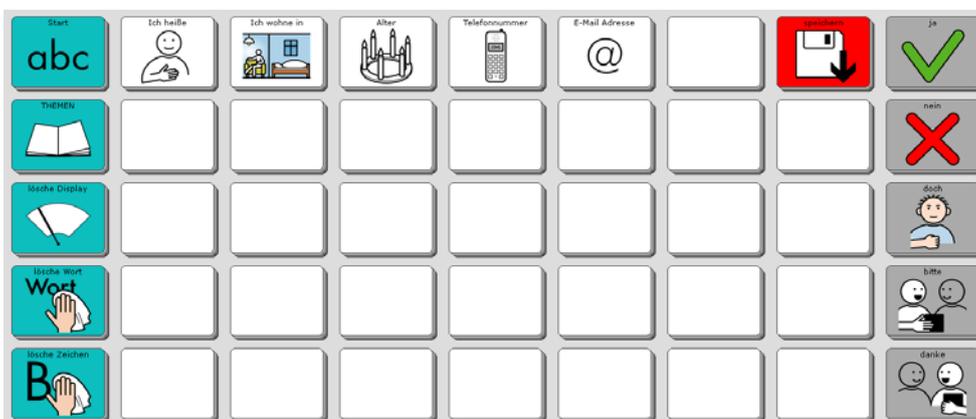

Verfahren Sie entsprechend mit allen Seiten, auf denen Sie die Taste „Speichern“ nutzen wollen.

## Taste „Speichern“ sichtbar machen über das Menü TOOLS

Die Taste „anzeigen/verbergen“ im Menü TOOLS ermöglicht ein schnelles und intuitives Sichtbarmachen von Tasten ohne den „Umweg“ über die Toolbox.


Öffnen Sie die Seite, auf der Sie eine Taste sichtbar machen oder verbergen wollen




Tippen Sie auf die Taste . Das Menü TOOLS wird angezeigt:

Tippen Sie auf die Taste .

Im Display erscheint wieder die aktuelle Seite. Ausgeblendete Felder werden ausgegraut angezeigt.

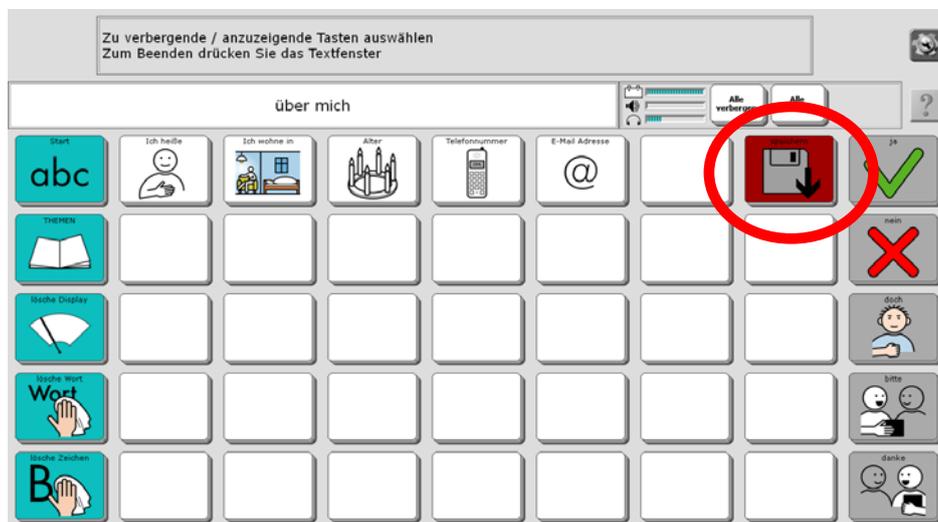


Tippen Sie auf die Taste „Speichern“ . Die Taste wird wieder „normal“ angezeigt.

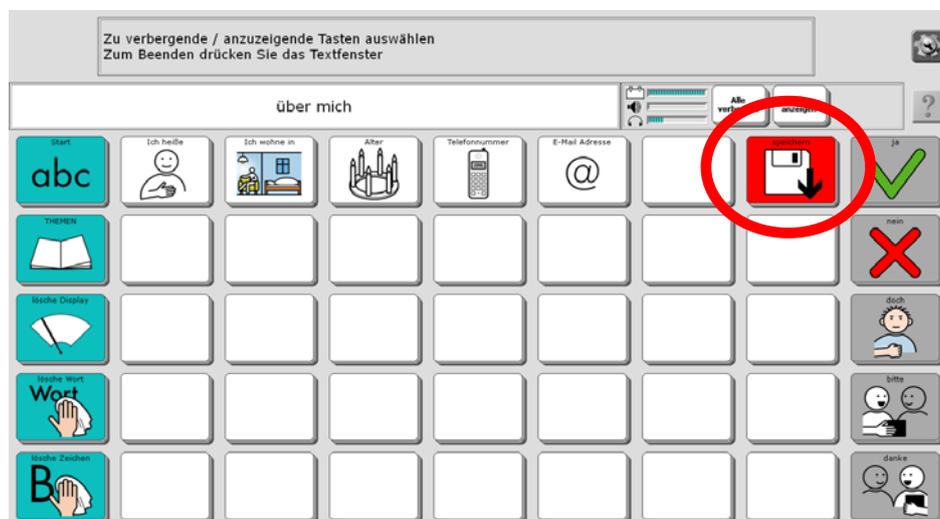


Tippen Sie oben in den grauen Bereich des Textfensters, um den Modus „Tasten verbergen / anzeigen“ zu beenden.

## Taste „Speichern“ benutzen


Formulieren Sie eine Aussage. Öffnen Sie anschließend über die Seite THEMEN die Themenseite, auf der Sie die Aussage dauerhaft speichern möchten (z. B. die Seite ÜBER MICH). Tippen Sie dort auf die Taste „Speichern“.

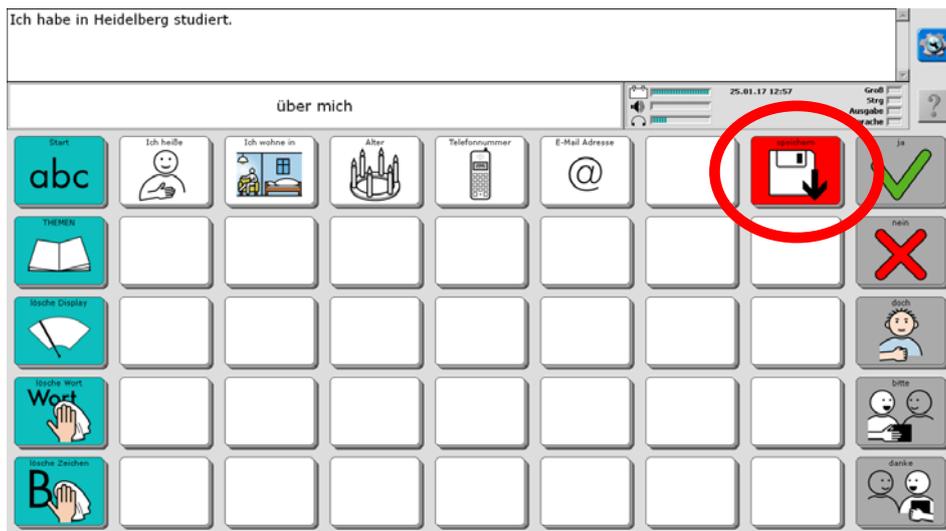

Wählen Sie die Taste aus, auf der die Aussage gespeichert werden soll. Wenn Sie eine bereits belegte Taste auswählen, wird der Inhalt der Taste überschrieben!

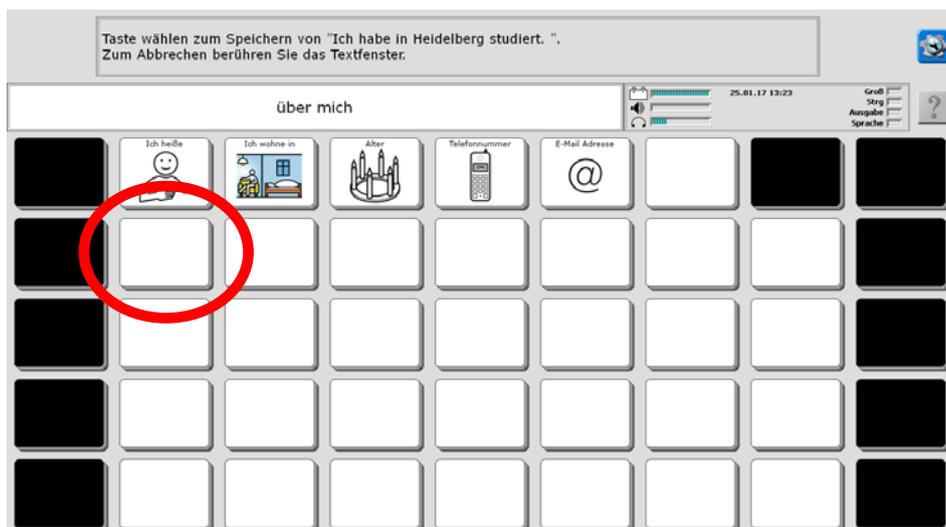


Die Aussage ist auf der Taste gespeichert.

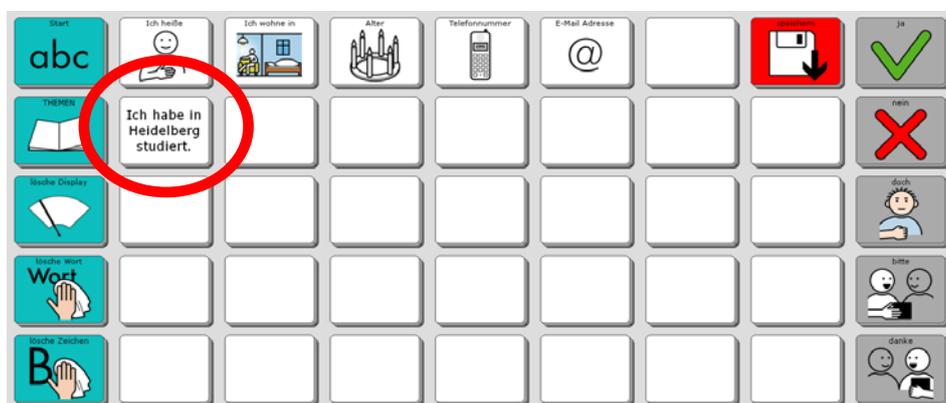

## Aussprache korrigieren

Besonders bei Namen von Personen und Orten kann es vorkommen, dass der Talker den Namen mit der synthetischen Stimme nicht so ausspricht, wie Sie es gerne hätten. In diesem Fall sollten Sie das betreffende Wort zum Aussprache-Lexikon hinzufügen, damit der Talker lernt, den Begriff richtig auszusprechen.

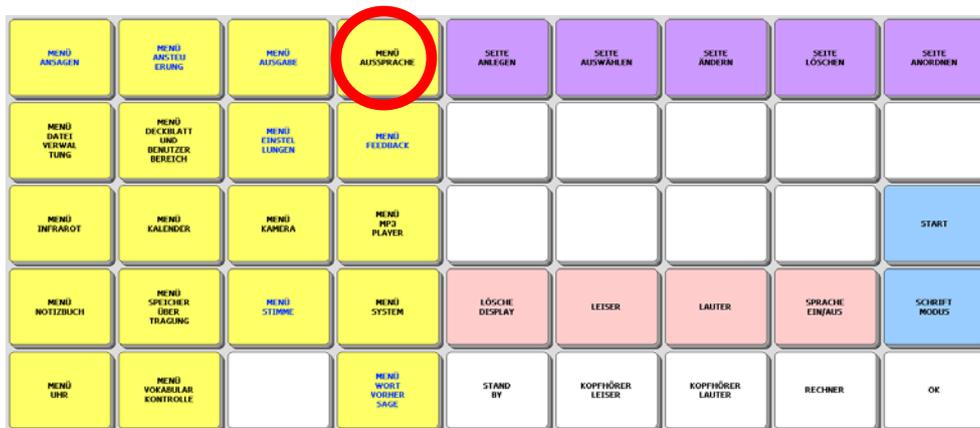

Wie Sie neue Wörter in das Aussprache-Lexikon einfügen können, entnehmen Sie bitte dem Heft „Das kleine Handbuch“, das Sie mit dem Talker erhalten haben.

## Besondere Funktionen des Talkers

Auf den Themenseiten INFRAROT, MEINE LIEDER, HANDY, NOTIZBUCH und FUNKTIONEN haben Sie Zugang zu besonderen Talkerfunktionen, die im Folgenden vorgestellt werden.


### Infrarot-Signale

Der Talker verfügt über eine eingebaute lernfähige Infrarot-Umfeldkontrolle. Das bedeutet, dass Sie mit dem Talker Ihre IR-fernbedienbaren Geräte steuern können, wenn Sie Ihr Gerät aus einer Liste geladen oder dem Talker die entsprechenden IR-Befehle beigebracht haben.

Bitte lesen Sie dazu die entsprechenden Abschnitte im Kapitel „Umfeldkontrolle“ in der Bedienungsanleitung.


Im Programm „ABC 45“ haben wir bereits Seiten angelegt, auf denen Sie die IR-Befehle für TV, Video, CD und Radio speichern können. Die Seiten zu den verschiedenen Geräten öffnen Sie von der INFRAROT-SEITE ausgehend.

### Die Seite INFRAROT

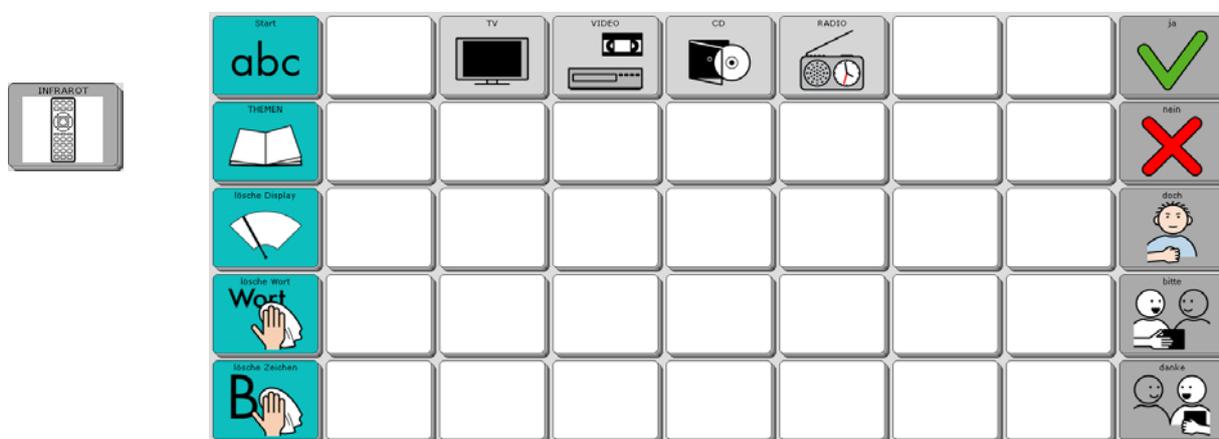

Diese Seite ermöglicht das Steuern von per Infrarot fernbedienbaren Haushaltsgeräten. Wählen Sie das Gerät, um die Seite mit den Befehlen angezeigt zu bekommen.

### Die Seite INFRAROT - TV

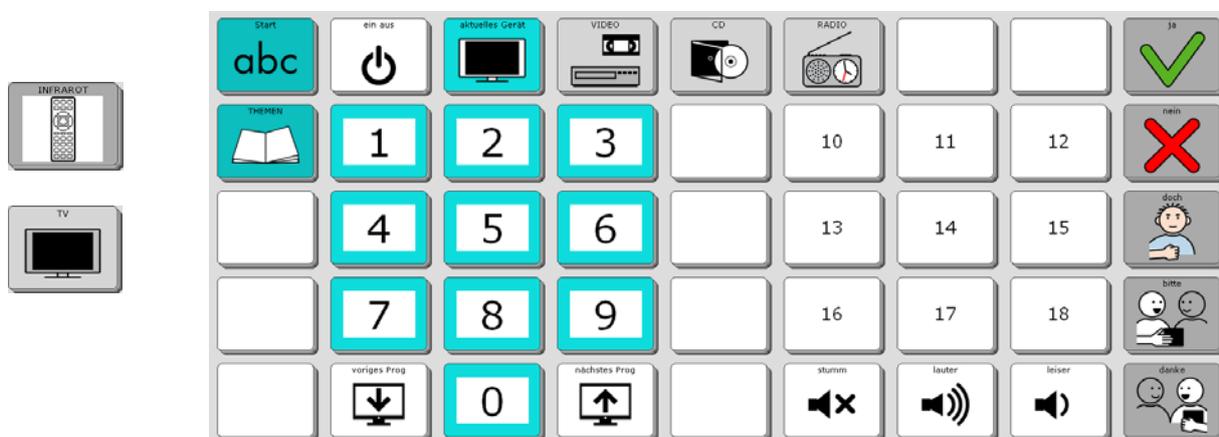


Diese Seite ermöglicht das Steuern eines per Infrarot fernbedienbaren Fernsehers.

## Die Seite INFRAROT - VIDEO



Diese Seite ermöglicht das Steuern eines per Infrarot fernbedienbaren Videorekorders.

## Die Seite INFRAROT - CD

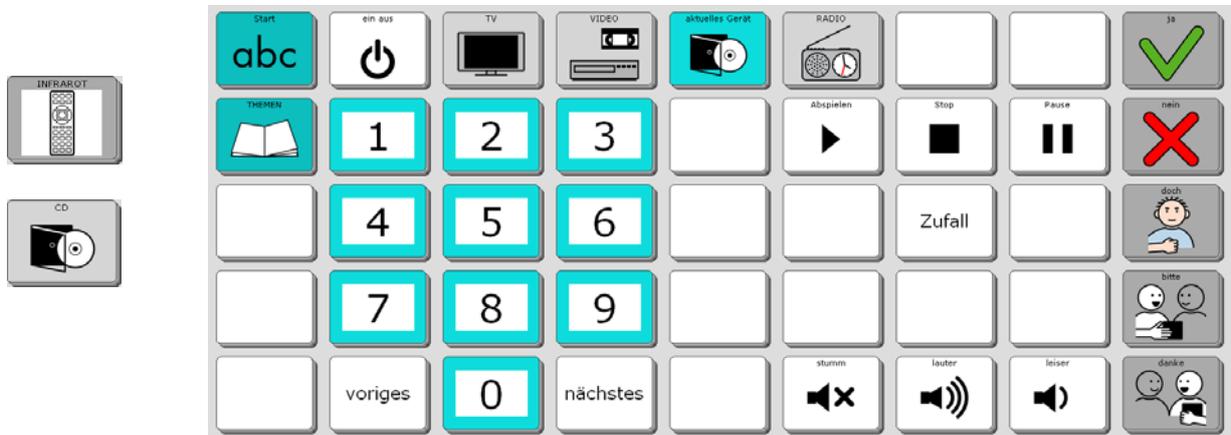

Diese Seite ermöglicht das Steuern eines per Infrarot fernbedienbaren CD-Players.


## Die Seite INFRAROT - RADIO



Diese Seite ermöglicht das Steuern eines per Infrarot fernbedienbaren Radios.

## Die Seite MEINE LIEDER

Der Talker kann Audio-Dateien im Format MP3, WMA und WAV wiedergeben. Sie können einzelne Dateien entweder direkt auf der Seite MEINE LIEDER speichern oder sie mit Hilfe des Menüs MP3-PLAYER von einem USB-Stick oder einer SD-Karte lesen lassen.

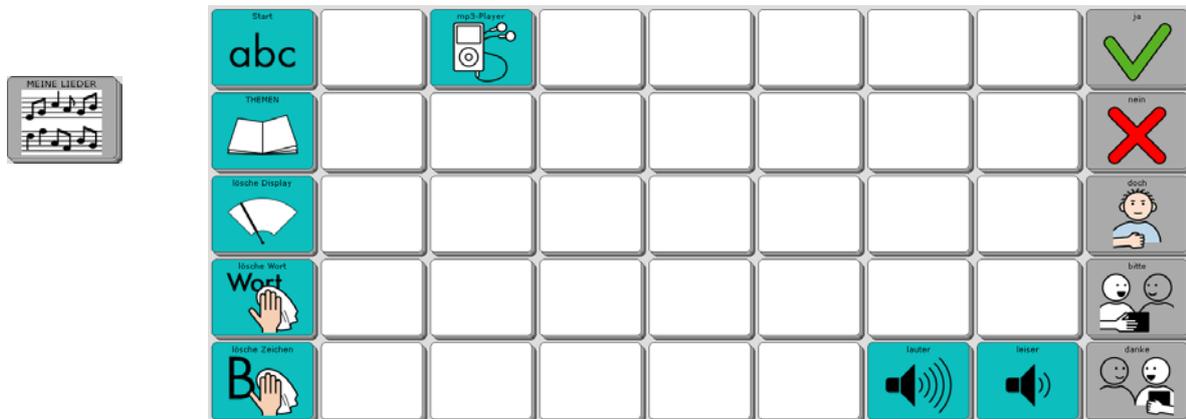


Um eine Musik-Datei direkt auf der Seite MEINE LIEDER zu speichern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. USB-Stick anschließen oder SD-Karte mit der oder den zu speichernden Datei(en) einlegen
2. Toolbox öffnen
3. SEITE ÄNDERN: Seite „MEINE LIEDER“ auswählen
4. Taste auswählen, auf der die Datei gespeichert werden soll
5. NAME ÄNDERN: z.B. Titel eingeben
6. ART DER MITTEILUNG: digital
7. SOUNDDATEI IMPORTIEREN: Datei auswählen
8. OK
9. START

Da Musik-Dateien viel Speicherplatz benötigen, empfehlen wir Ihnen, nur eine begrenzte Zahl von Liedern direkt auf der Seite MEINE LIEDER zu speichern und ansonsten das Menü MP3-PLAYER zur Wiedergabe von Sounddateien zu benutzen, die von einem externen Datenträger (USB-Stick, SD-Karte) wiedergegeben werden. Die Wiedergabe steuern Sie mit Hilfe des Menüs MP3-Wiedergabe, das Sie über die Taste




erreichen.

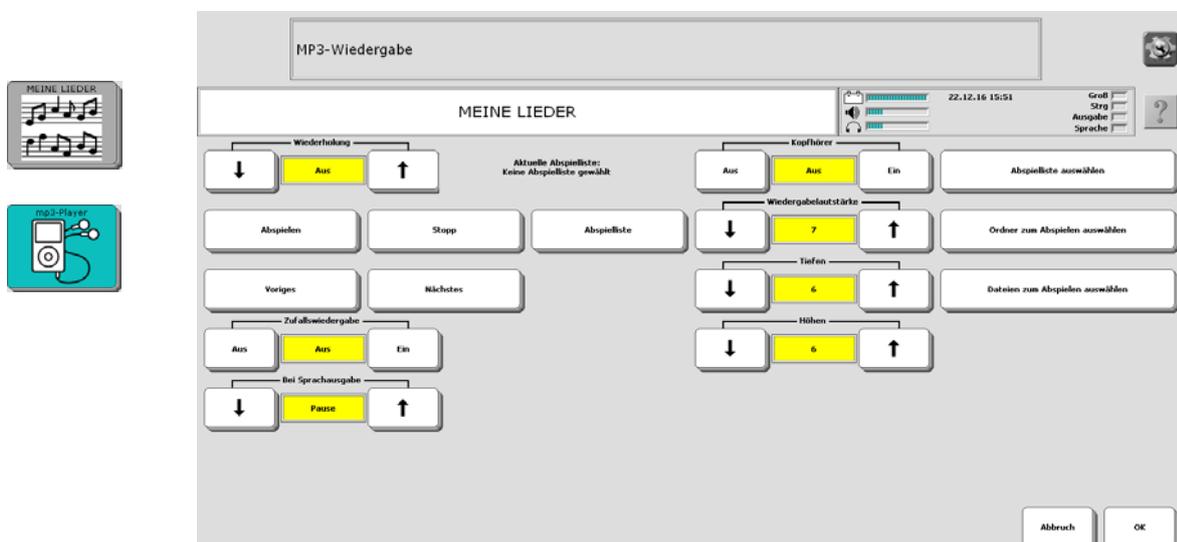

Lesen Sie dazu bitte das Kapitel „MP3-Player“ in der Bedienungsanleitung.


## Die Seite HANDY

Diese Seite ermöglicht das Steuern eines mittels Bluetooth gekoppelten Mobiltelefons oder Smartphones.

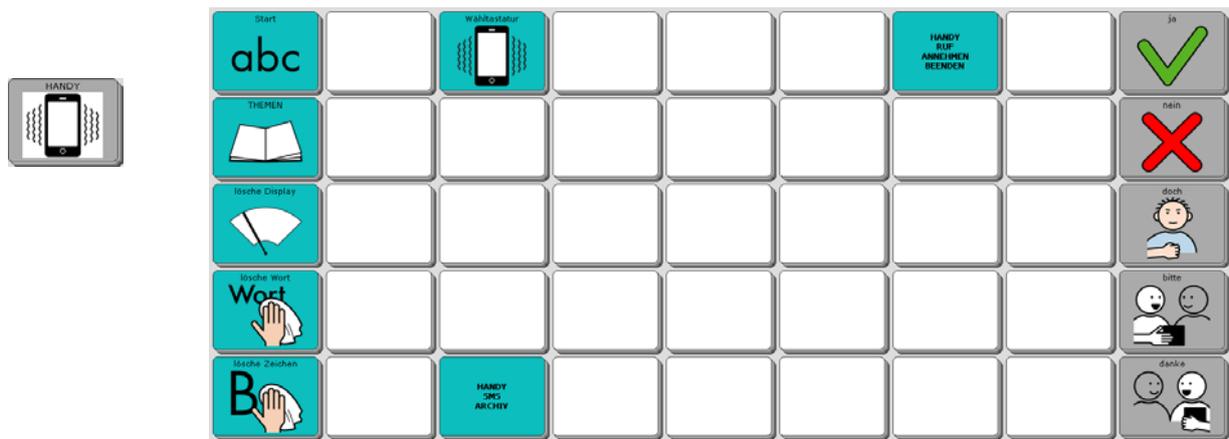

### Wähltastatur

Die Taste  öffnet das Menü „Wähltastatur“.

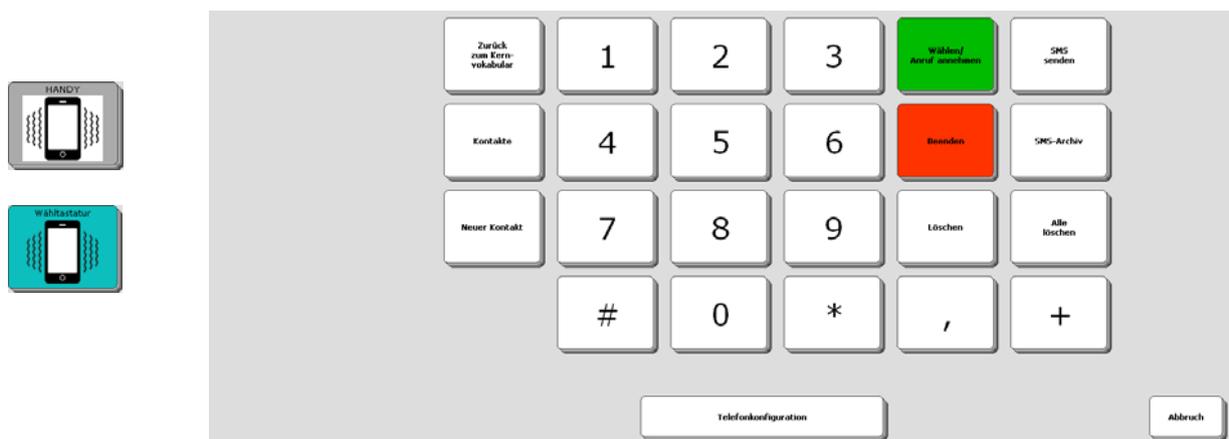

### Handy Ruf annehmen / beenden


Die Taste  dient zum Annehmen eines eingehenden Anrufs. Mit derselben Taste kann ein laufender Anruf auch wieder beendet werden.

### Handy SMS-Archiv

Bei geeigneten Mobiltelefonen und Smartphones hat der Accent Zugriff auf das SMS-Archiv. Mit der Taste  können Sie das Archiv öffnen und eingegangene SMS lesen.


Ausführliche Informationen zum Thema Handysteuering mit dem Talker finden Sie in der Bedienungsanleitung im Kapitel „Handysteuering“.  
Dort finden Sie auch Hinweise auf die jeweiligen Einstellungen für Bluetooth- oder USB-Verbindungen.

## Die Seite NOTIZBUCH

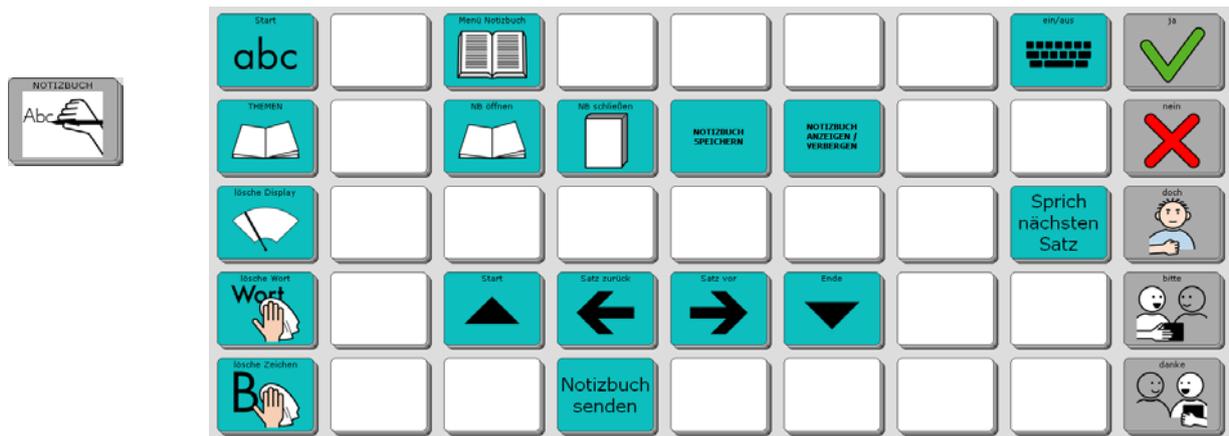

Wenn Sie längere Texte verwalten möchten, können Sie dafür die NOTIZBUCH-Funktionen des Talkers benutzen. Ein geöffnetes Notizbuch erkennen Sie am gelb hinterlegten Textfenster. Alles, was Sie in ein Notizbuch schreiben, bleibt erhalten. Auf dieser Seite stehen Ihnen wichtige Optionen des Menüs NOTIZBUCH zur Verfügung.

## Menü Notizbuch

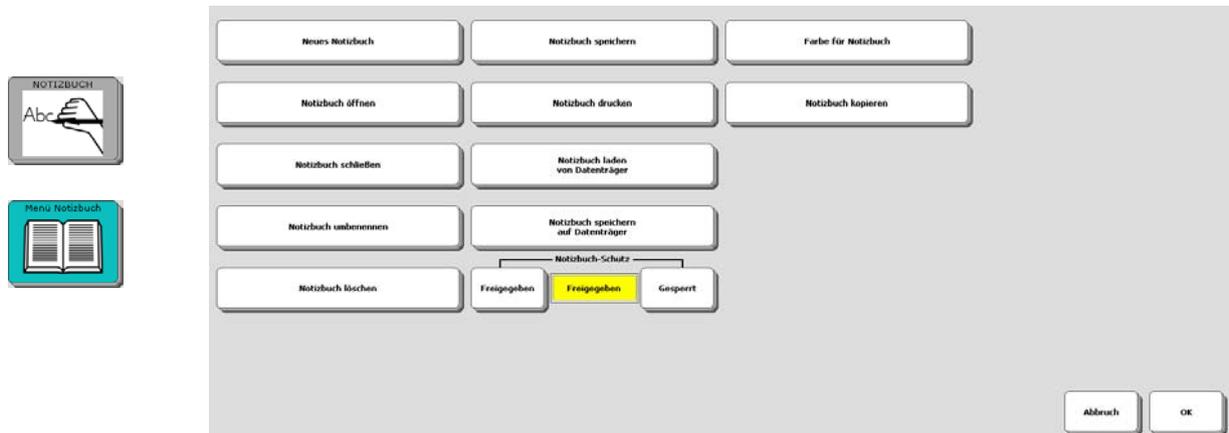


Die Taste „Menü Notizbuch“ öffnet das Talker-Menü NOTIZBUCH mit allen Optionen.


## Notizbuch öffnen



Die Taste „Menü Notizbuch“ öffnet die Übersicht aller angelegter Notizbücher. Tippen Sie auf ein Notizbuch, um es zu öffnen.

## Notizbuch schließen

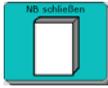

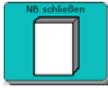Die Taste  schließt das aktuell geöffnete Notizbuch wieder. Alle Ihre Änderungen werden automatisch gesichert.

## Notizbuch speichern



Die Taste  dient zum Speichern des aktuellen Notizbuches, ohne es zu schließen.

## Notizbuch anzeigen/verbergen



Die Taste  dient zum Verbergen des aktuellen Notizbuches. Es bleibt im Hintergrund geöffnet. Wählen Sie erneut „Notizbuch anzeigen/verbergen“, um ein im Hintergrund geöffnetes Notizbuch wieder in den Vordergrund zu bringen.

## Start



Die Taste  positioniert den Cursor an den Anfang des Notizbuches.

## Satz zurück




Die Taste  positioniert den Cursor an den Anfang des Satzes / des vorigen Satzes.


## Satz vor



Die Taste  positioniert den Cursor an das Ende des Satzes / den Anfang des nächsten Satzes.

## Ende

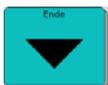

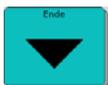Die Taste  positioniert den Cursor an das Ende des Notizbuches.

## Sprich nächsten Satz



Die Taste  spricht den Satz des Notizbuchs, in dem der Cursor gerade steht. Jede erneute Auswahl dieser Taste spricht einen weiteren Satz.

## Ein/aus




Die Taste  schaltet die Ausgabe aus bzw. wieder ein (siehe Menü AUSGABE im NuVoice-Handbuch).

## Notizbuch senden



Die Taste  sendet das Notizbuch an das im Menü AUSGABE eingestellte Gerät (siehe Menü AUSGABE im NuVoice-Handbuch).

## Die Seite FUNKTIONEN

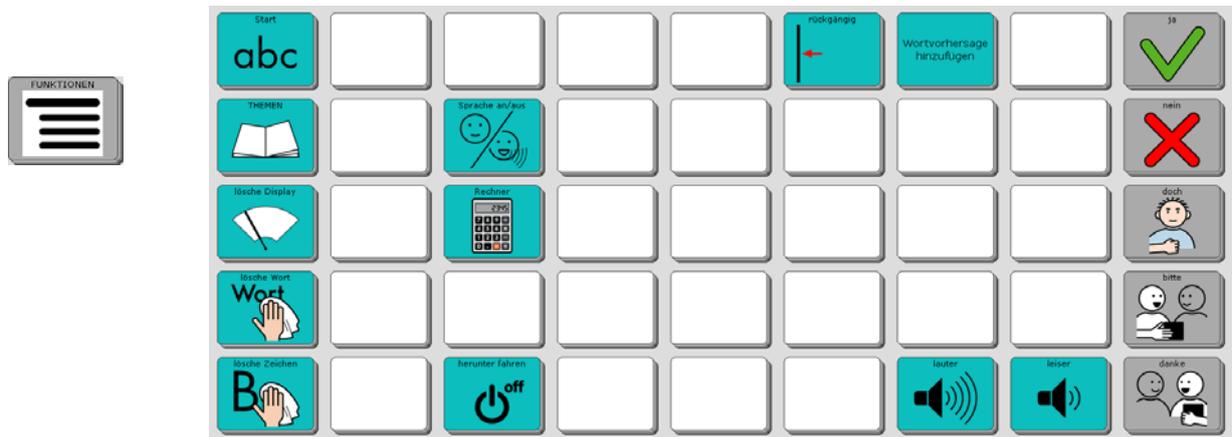

Diese Seite ermöglicht Zugriff auf wichtige Talker-Funktionen und den Taschenrechner.

### Sprache an/aus



Die Taste  schaltet die Sprachausgabe aus bzw. wieder ein. Bei ausgeschalteter Sprachausgabe spricht der Talker nur, wenn Sie auf das Textfenster tippen. Den aktuellen Zustand erkennen Sie in der Statuszeile des Displays.



Sprachausgabe ist eingeschaltet




Sprachausgabe ist ausgeschaltet

### Rechner



Die Taste  auf der Seite FUNKTIONEN öffnet einen einfachen Taschenrechner. Das Ergebnis der Berechnung befindet sich in der Zwischenablage und kann mit dem Befehl EINFÜGEN in das Textfenster kopiert werden.

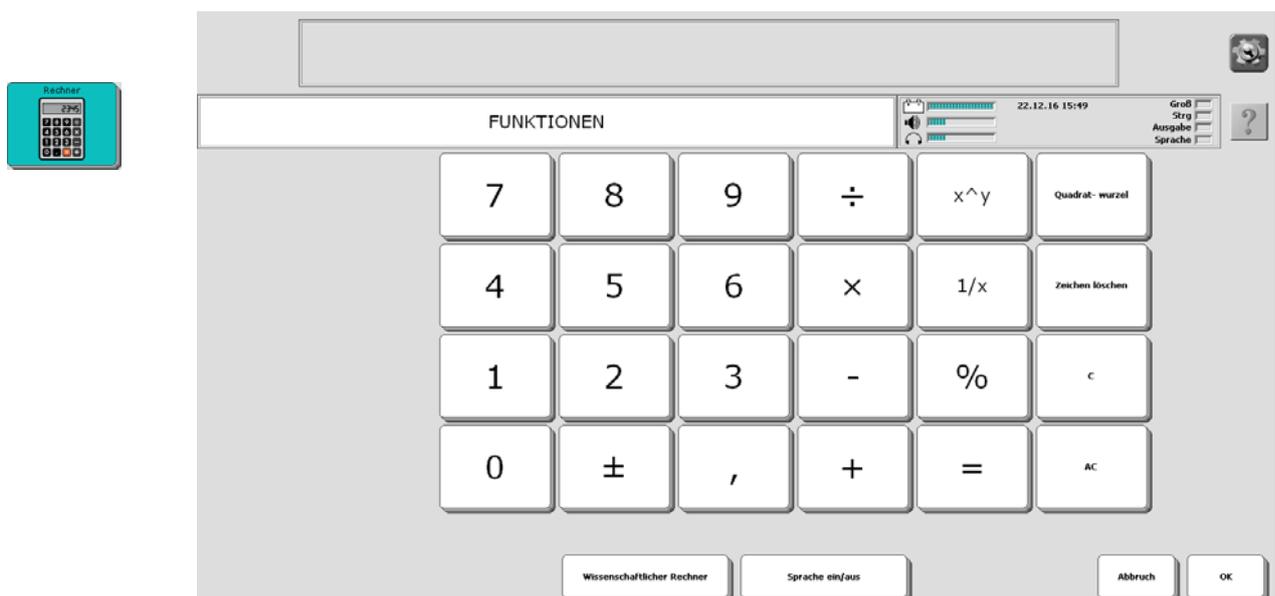

## Herunterfahren



Die Taste  beendet NuVoice, fährt das Betriebssystem herunter und schaltet den Accent aus. Sie müssen das Herunterfahren bestätigen. Der Neustart des Accents kann bis zu 2 Minuten dauern.

## Rückgängig



Die Taste  macht die letzte Aktion rückgängig. Falls Sie versehentlich etwas gelöscht haben das Sie nicht löschen wollten, können Sie den Löschvorgang mit dieser Taste wieder ungeschehen machen.

Es kann nur der zuletzt getätigte Befehl rückgängig gemacht werden.

Kopieren Sie die Taste auf die Schriftseite und andere Seiten, auf denen Sie sie benötigen.

## Wortvorhersage hinzufügen



Die Taste  erlaubt Ihnen das Hinzufügen eines Wortes zur Wortvorhersage. Es wird ohne Nachfrage das letzte im Textfenster enthaltene Wort hinzugefügt.

Nach dem Hinzufügen wird Ihnen das Wort automatisch vorgeschlagen und Sie brauchen es nicht jedes Mal komplett einzutippen.

## Lauter



Die Taste  erhöht die Lautstärke der Sprachausgabe um eine Stufe.

## Leiser



Die Taste  reduziert die Lautstärke der Sprachausgabe um eine Stufe.


## Eine letzte Anregung: Speicherübertragung durchführen

Sichern Sie regelmäßig das „ABC 45“ -Programm mit Ihren persönlichen Änderungen, damit Sie im Falle eines Datenverlustes (auch der Talker ist ein Computer!) eine Sicherungskopie Ihres Vokabulars in das Gerät zurück laden können.


### Benutzerbereich sichern

Schließen Sie den mitgelieferten USB-Stick an den Talker an.


Öffnen Sie die Toolbox und wählen Sie das <MENÜ SPEICHERÜBERTRAGUNG>

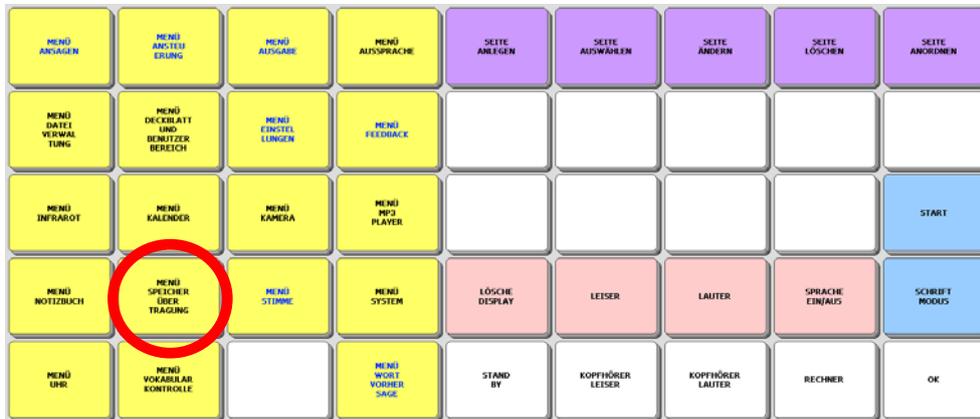


Tippen Sie auf das Feld <Benutzerbereich sichern>

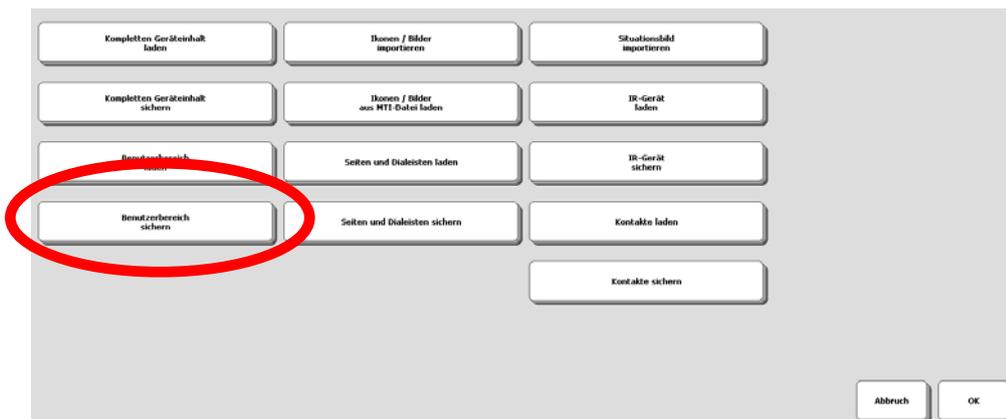

Wählen Sie den aktuellen Bereich als zu sichernden Bereich aus.

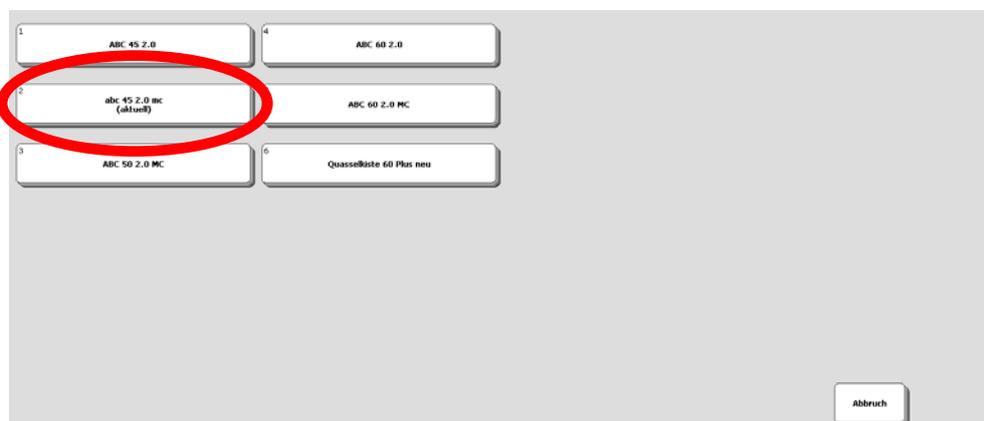


Wählen Sie den Ordner, in dem die Datei gespeichert werden soll.  
Geben Sie mit Hilfe der angezeigten Schrifttastatur einen Dateinamen ein

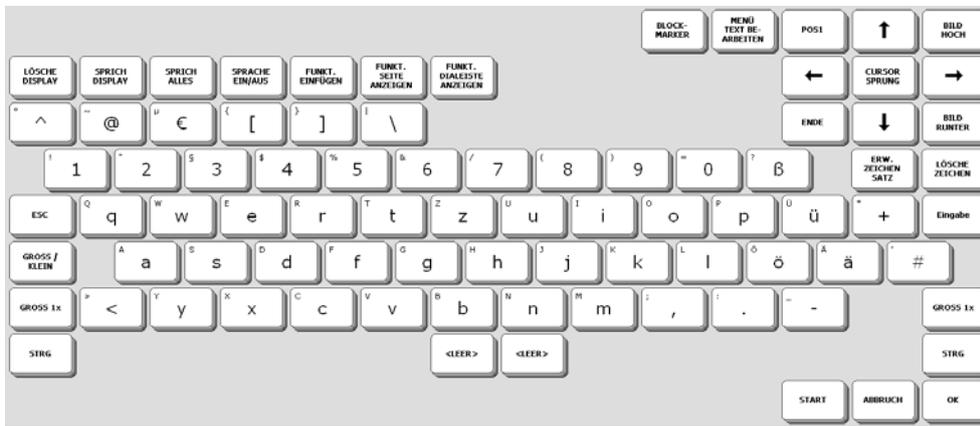

Bestätigen Sie die Eingabe mit <OK>.

Wenn die Speicherübertragung beendet ist, erscheint eine entsprechende Meldung im Display:

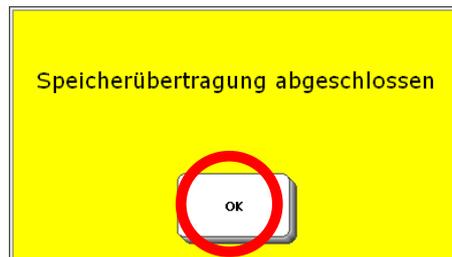

Drücken Sie <OK> im gelben Feld und danach zweimal <OK>, um das Menü zu beenden.

## **Benutzerbereich laden**

Wenn Sie eine Datei zurück in den Talker laden möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Haben Sie die Datei auf einem USB-Stick, so schließen Sie diesen an den Talker an.
2. Toolbox öffnen
3. <Menü Speicherübertragung>
4. <Benutzerbereich laden>
5. Benutzerbereich auswählen, in den die Datei geladen werden soll
6. Die im aktuellen Ordner vorhandenen Dateien werden angezeigt
7. Wechseln Sie ggf. zu dem Ordner, der die zu ladende Datei enthält.
8. Wählen Sie die zu ladende Datei aus.
9. Die Speicherübertragung wird durchgeführt.
10. Drücken Sie <OK> im gelben Feld und danach <OK>, um das Menü zu beenden.
11. <START> bringt Sie zurück zum Start des Programms.

**Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Talker!**

# ABC 50

## Version mit oder ohne Metacom-Symbole

Das Wortschatzprogramm „ABC 50“ gibt es in 2 Versionen, eines mit und eines ohne Metacom-Symbole. Die Version ohne Metacom-Symbole nutzt die mitgelieferten PRD-Symbole zur Kennzeichnung von Funktionstasten und Aussagen, die Version mit Metacom nutzt Metacom-Symbole.



ABC 50 ohne Metacom-Symbole

ABC 50 mit Metacom-Symbolen

Die im Folgenden gemachten Angaben gelten für beiden Versionen, auch wenn die Grafiken die Version ABC 50 mit Metacom-Symbolen zeigen.

## Die SCHRIFT-SEITE

Schalten Sie den Talker mit der Ein/Aus-Taste ein.

Nach dem Startvorgang erscheint folgendes Bild im Display:



Die oberste Zeile, die im Augenblick noch leer ist, heißt Textfenster. Hier erscheinen im Folgenden die Buchstaben und Wörter, die Sie schreiben.

Die Buchstaben auf der SCHRIFT-SEITE sind gemäß der QWERTZ-Tastaturbelegung angeordnet, wie sie vom Computer her bekannt ist.

In den grauen Feldern erscheinen die Vorschläge der Wortvorhersage, sobald Sie zu schreiben beginnen. Tippen Sie auf ein Feld, um einen Vorschlag zu übernehmen.

Sie können sofort mit dem Schreiben beginnen.


Tippen Sie z.B. nacheinander die einzelnen Buchstaben h a l l o und am Ende die Taste <leer> ganz oben links.

(Stören Sie sich bitte nicht daran, dass der Talker die einzelnen Buchstaben nicht laut ausspricht. Das liegt daran, dass die Sprache ausgeschaltet ist. Wie man die Sprachausgabe ein- und ausschalten kann, erfahren Sie bei den Erläuterungen zur THEMEN-SEITE weiter hinten in dieser Einführung.)

Im Textfenster in der oberen Zeile erscheint das Wort „hallo“.  
Tippen Sie auf das angezeigte Wort „hallo“, und der Talker spricht das ganze Wort.

## Grüne Funktionstasten

Auf der SCHRIFT-SEITE befinden sich auch einige grün unterlegte Tasten mit Funktionen, die beim Schreiben wichtig sind:

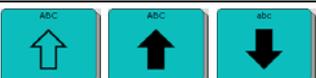Version mit META-COM-Symbolen	Version ohne META-COM-Symbole	
		Zeichen löschen
		Wort löschen
		Inhalt des Textfensters löschen
		Wechsel zwischen Groß-, permanent Groß- und Kleinschreibung
		Wechsel zur THEMEN-SEITE
		Wechsel zur ZEICHEN-SEITE
		Wechsel zur CHAT-SEITE
		Inhalt des Textfensters wiedergeben (alternativ zum Tippen ins Textfenster)

## Die ZEICHEN-SEITE

Drücken Sie auf der SCHRIFT-SEITE die Taste .

Die Anzeige im Display wechselt und Sie sehen nun die ZEICHEN-SEITE:



Die ZEICHEN-SEITE bleibt geöffnet, bis Sie sie manuell wieder schließen:


Drücken Sie die Taste , um wieder auf die Startseite zu gelangen.

Drücken Sie die Taste , um auf die THEMEN-SEITE zu gelangen.

## Wortvorhersage


Der Talker verfügt über eine leistungsfähige Wortvorhersage, bestehend aus einer Wortvervollständigung des gerade eingegebenen Wortes und einer Vorhersage des nächsten Wortes.

Beim Schreiben erscheinen auf den grauen Tasten Wortvorschläge, die Sie durch direktes Antippen auswählen können, um den Schreibprozess abzukürzen.

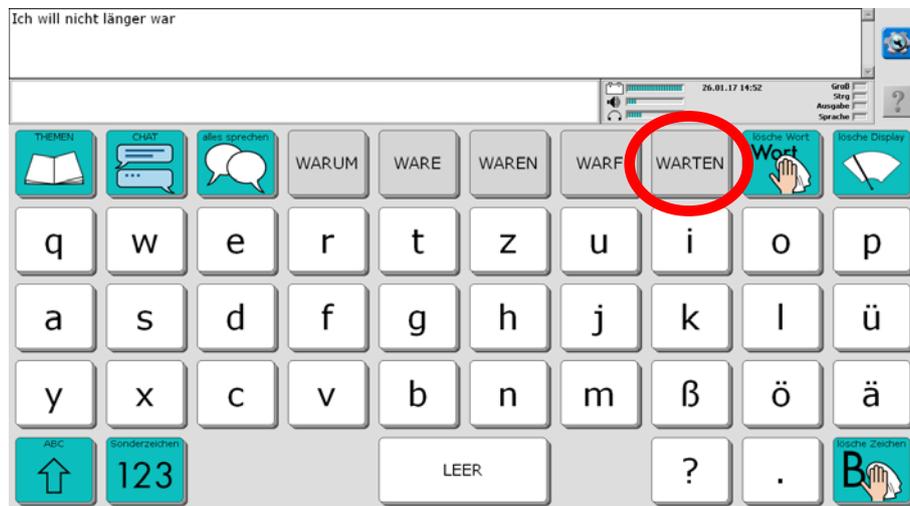

Sie können neue Wörter ganz einfach über die Taste „Wortvorhersage hinzufügen“ (Seite FUNKTIONEN) zum Wortvorhersagelexikon hinzufügen (siehe Seite 78).

Ein- und Ausschalten sowie anpassen können Sie die Wortvorhersage über die Toolbox, Menü Wortvorhersage.

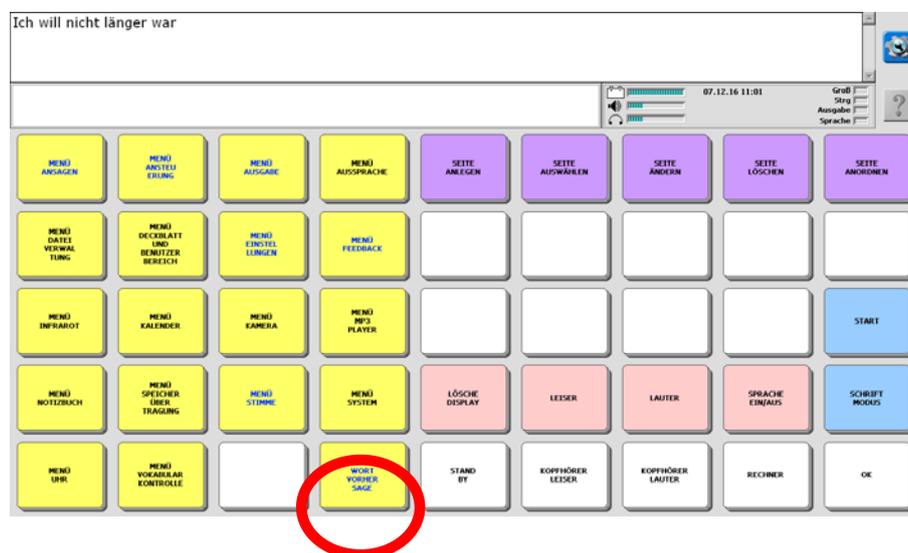

Weitere Informationen zur Wortvorhersage entnehmen Sie bitte dem NuVoice-Software-Manual und dem „Das kleine Handbuch“, welche Sie zusammen mit dem Talker erhalten haben.

## Die THEMEN-SEITEN

Zusätzlich zu den Möglichkeiten der Schrifteingabe bietet der Talker auch die Funktion, Wörter und Sätze, die man häufig benötigt, als Ganzes abzuspeichern, damit man sie nicht jedes Mal wieder schreiben muss.



Drücken Sie die Taste Themen auf der SCHRIFT-SEITE.  
Die Anzeige im Display wechselt und Sie sehen die THEMEN-SEITE:



Die hell hinterlegten Tasten öffnen Seiten zu verschiedenen Themenbereichen, die Sie individuell verändern können (weiter hinten in dieser Einführung wird die entsprechende Vorgehensweise erläutert). Auf den Tasten steht jeweils der Name der damit zu öffnenden Seite.

Die grau umrandeten Tasten bieten Zugang zu speziellen Seiten zur Steuerung von Smartphone, Tablet, Maus und Computer sowie zu wichtigen Gerätefunktionen.

Die grau hinterlegten Aussagen „ja“, „doch“, „nein“, „bitte“ und „danke“ in der oberen Zeile sind auf allen Themenseiten zu finden. **Bei allen grau hinterlegten Tasten gilt: Die Tasten dienen dem Kommentieren, der jeweilige Inhalt wird nicht im Textfenster angezeigt!**



Zurück zur Themen-Auswahlseite



Wechsel zurück zur SCHRIFT-SEITE



Schaltet die Sprachausgabe aus bzw. wieder ein.



Der gesamte Inhalt des Textfensters wird gesprochen.



Löscht das letzte Wort im Textfenster.



Löscht den gesamten Inhalt des Textfensters.



Löscht den zuletzt eingegebenen Buchstaben im Textfenster.

Im Folgenden sind alle Themenseiten abgebildet.

## Die Seite ÜBER MICH



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
	Ich heiße	Ich wohne in	Alter	Telefonnummer	e-mail Adresse				
Start									lösche Zeichen
abc									B

## Die Seite FRAGEN



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
	Was ist das?	Was gibt es Ne							
	Wann wieder?	Was gestern?	Wie geht es dir						
	Wie viel?								
Start									lösche Zeichen
abc									B

## Die Seite ORTE



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
	Apotheke	Bäcker	Bahnhof	Bank	Geschäft	Kino	Kiosk		
	Kirche	Markt	Metzger	Park	Post	Supermarkt	Tankstelle		
Start									lösche Zeichen
abc									B

## Die Seite ESSEN



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
Start	Hunger	wann?	was?	etwas anderes	das reicht	schlecht	darf nicht		lösche Zeichen
abc									B

## Die Seite TRINKEN



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
Start	Durst	brauche Hilfe	was?	etwas anderes	das reicht	schlecht	darf nicht		lösche Zeichen
abc									B

## Die Seite SÄTZE



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
Start									lösche Zeichen
abc									B

## Die Seite NAMEN



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
Start	Wie heißt du?	Wie heißen Sie?							lösche Zeichen
abc									B

## Die Seite WOHLFÜHLEN



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
Start	langweilig	so ist es gut	nicht richtig						lösche Zeichen
abc									B

## Die Seite MEDIZIN



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
Start	neues Rezept	brauche Hilfe	Arzt sprechen	verstanden	nicht verstanden	Wann wiederse			lösche Zeichen
abc									B

## Die Seite ZEIT



Mit der Tasche geben Sie das aktuelle Datum aus.



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	Woche	Tag
Datum	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So		LEER
	1	2	3	4	5	6	Uhr	Wochenende	
	7	8	9	10	11	12	Stunde	Monat	
Start	früh	gestern	heute	morgen	nach	spät	Minute	Jahr	lösche Zeichen
abc									B

## Die Seite FLOSKELN



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
	Hallo!	Guten Tag!	Tschüss!	Auf Wiedersehen		Moin!	Gruß Gott!		
	Glückwunsch!	Alles Gute!	Entschuldigung!	Frohe Weihnach					
Start									lösche Zeichen
abc									B

## Die Seite FAMILIE



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
	Enkel	Sohn	Vater	Opa	Bruder	Schwigersohn			
	Enkelin	Tochter	Mutter	Oma	Schwester	Schwiegertochter			
Start									lösche Zeichen
abc									B

## Die Seite KLEIDUNG



THEMEN		alles sprechen	ja	nein	doch	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
Start	Aussehen?	Wie Wetter?	Anschauen!						lösche Zeichen
abc									B

## Die Seite PFLEGE



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
	Zahne putzen	waschen	duschen	baden					
Start	Türe zu!	brauche Hilfe	Toilette!						lösche Zeichen
abc									B

## Die Seite KÖRPER



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
Start	möchte liegen	brauche Hilfe	Jucken!	Schmerzen!	Übelkeit!				lösche Zeichen
abc									B

## Die Seite MEINE SÄTZE 1



THEMEN	speichern	alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
Start abc									lösche Zeichen B

## Die Seite MEINE SÄTZE 2



THEMEN	speichern	alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
Start abc									lösche Zeichen B

## Die Seite LEUTE



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
	Besucher	Nachbar							
	Frau	Mann							
	Mädchen	Junge	Kind						
Start abc	Krankenschwester	Pfleger							lösche Zeichen B

## Die Seite TELEFON



THEMEN	alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
	Hallo!	Tschüs!						
	Hier spricht	Sprach Computer	Bitte ja/nein-Fragen stellen	Moment bitte, ich schreibe		Ihre Handy Nummer	Ihre Tel. Nummer	
	Bitte wiederholen Sie	Bitte erklären	Ich habe nicht verstanden	Ich habe verstanden		Meine Handy Nummer	Meine Tel. Nummer	
Start abc	Wie ist Ihr Name	Bitte später wieder anrufen						lösche Zeichen B

## Die Seite CHAT



THEMEN	Sprache an/aus	alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
	Ja/Nein Frage	ich antworte gerade							
	ich verstehe alles	bitte die Frage wiederholen							
Start abc								lösche Zeichen B	

## Die Seite FREI 1



THEMEN	alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
Start abc								lösche Zeichen B

## Die Seite FREI 2

FREI  
**2**

THEMEN	alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
Start abc								lösche Zeichen B

## Die Seite FREI 3

FREI  
**3**

THEMEN	alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
Start abc								lösche Zeichen B

## Die Seite FREI 4

FREI  
**4**

THEMEN	alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
Start abc								lösche Zeichen B

## Eigene Änderungen einfügen

Bevor wir zu den Sonderfunktionen in der unteren Zeile der THEMEN-SEITE kommen, erfahren Sie, wie Sie eigene Änderungen in das Programm „ABC 50“ einfügen können.


### Seiten ändern über die Toolbox

Das Programm „ABC 50“ ist aus einzelnen Seiten zusammengesetzt. Um Änderungen vorzunehmen, werden Sie hauptsächlich die lila Tasten in der oberen Reihe der Toolbox benötigen.

Wie Sie Seiten ändern können, wird im Folgenden Schritt für Schritt am Beispiel der Seite ÜBER MICH erläutert:

Öffnen Sie die Toolbox.

Drücken Sie die Taste SEITE ÄNDERN

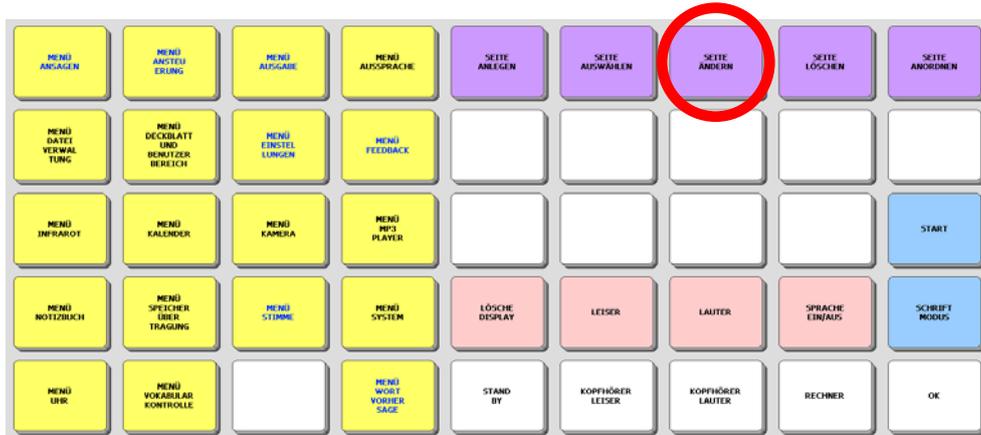


Wählen Sie die zu ändernde Seite aus: ÜBER MICH



Im Display erscheint die Seite ÜBER MICH. Oben links im Textfenster steht die Aufforderung: „Taste auswählen“.




Ändern Sie die für Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihr Alter und Ihre Telefonnummer vorbereiteten Tasten.  
Wählen Sie die Taste „Ich heiße“. Sie sehen folgende Anzeige:

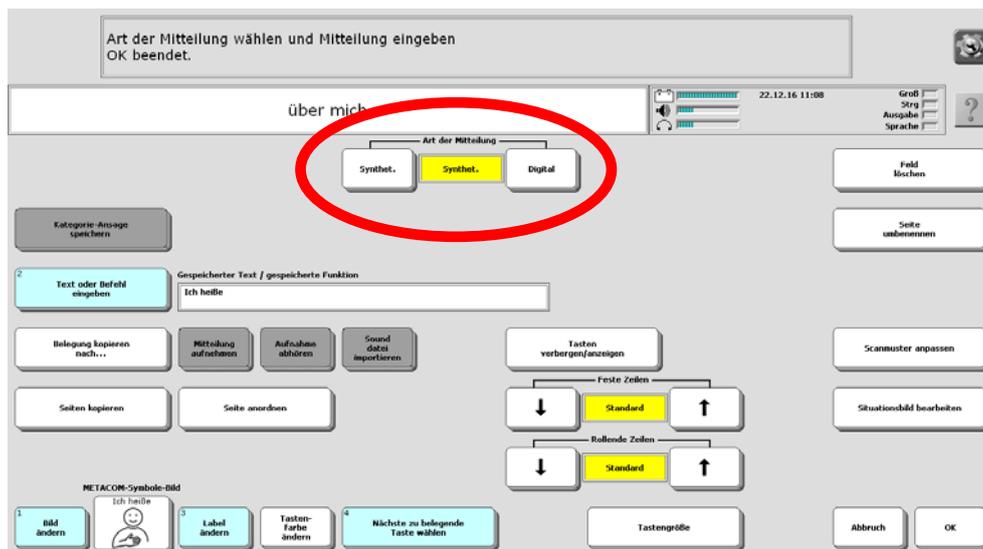


Im gelben Feld oben in der Mitte steht für „Art der Mitteilung = synthet.“.  
Das bedeutet, dass die Mitteilung mit der Computerstimme des Talkers gesprochen wird.

Darunter sehen Sie:

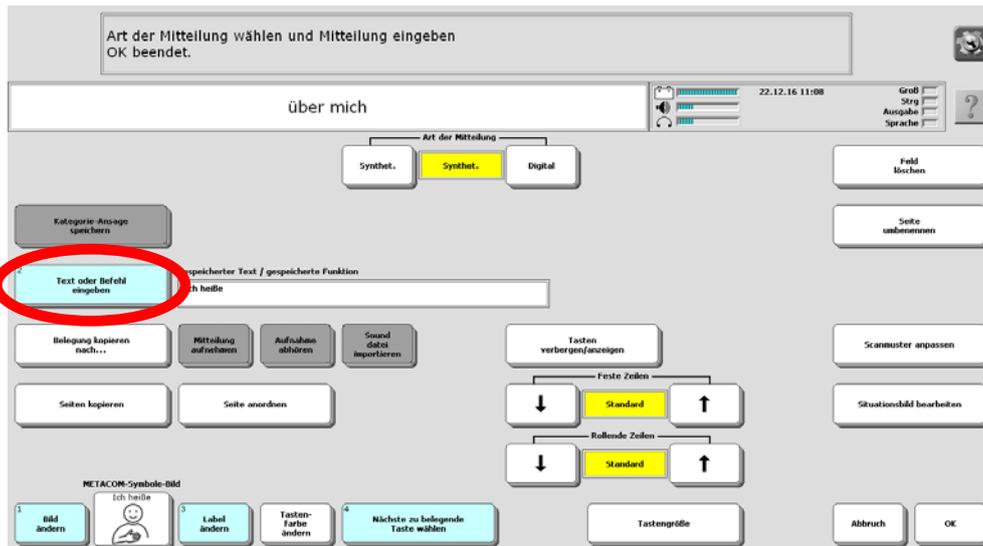


Drücken Sie <Text oder Befehl eingeben>. Mit Hilfe der Buchstabentastatur, die dann erscheint, können Sie Ihren Namen ergänzen.

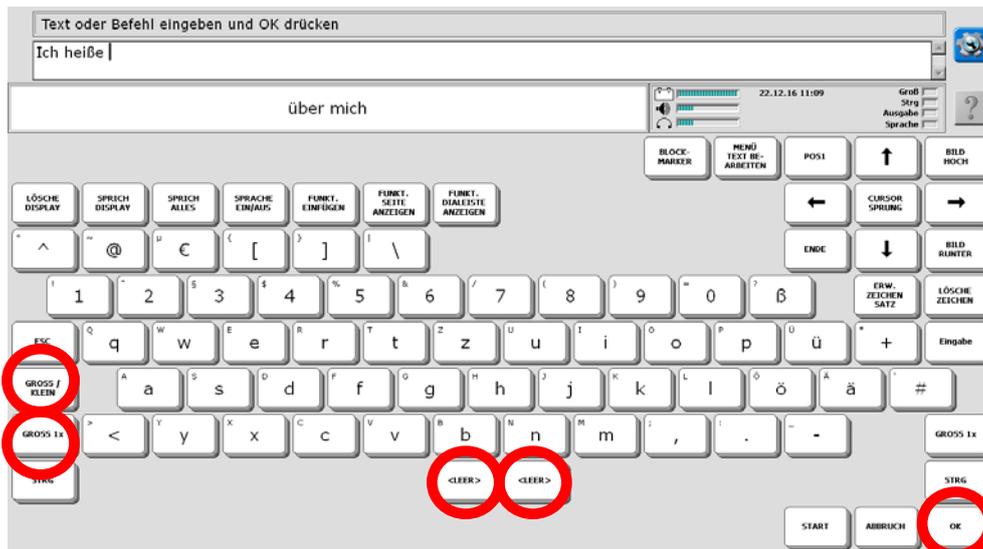


Mit den beiden Tasten unten links können Sie die Groß- und Kleinschreibung verändern.

Nach Ihrem Namen machen Sie bitte ein Leerzeichen (unten Mitte). Beenden Sie die Eingabe mit <OK> (unten rechts).

Die Anzeige im Display springt zurück und Sie sehen den ergänzten Text:

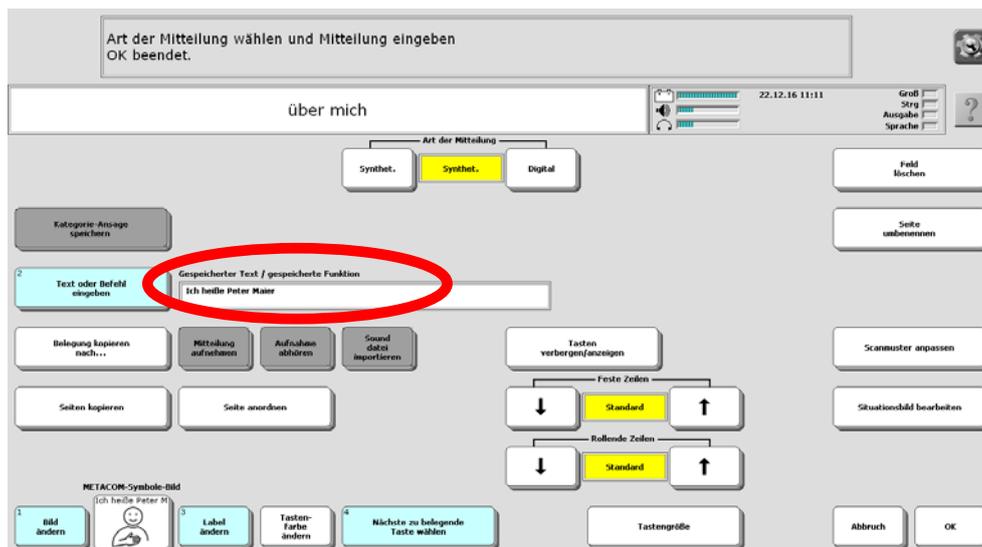


Um auch die Angaben auf den Tasten <Ich wohne in>, <Alter>, <Telefonnummer> und <e-mail Adresse> zu ergänzen, drücken Sie das Feld <nächste zu belegende Taste wählen> und verfahren Sie wie im vorangegangenen Beispiel.

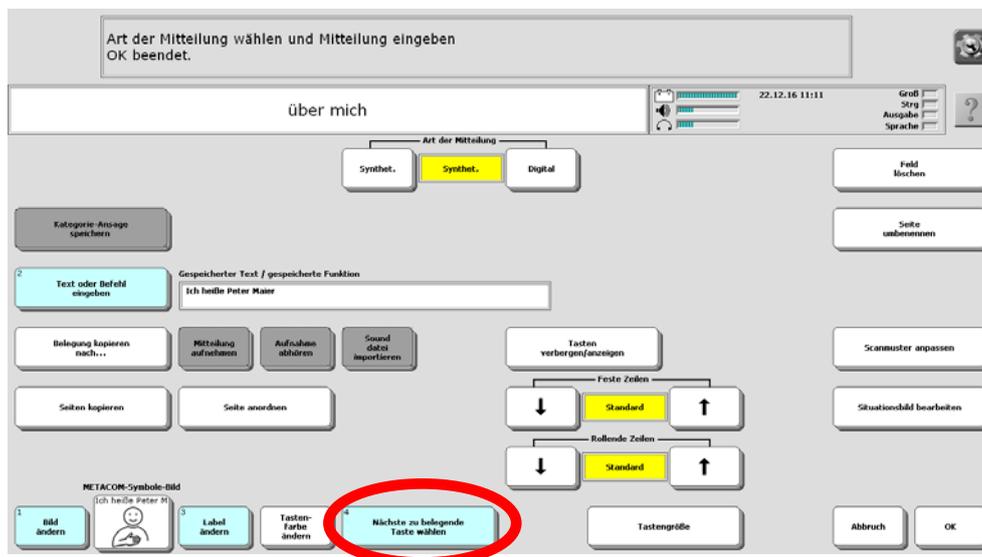


Felder, auf denen noch nichts gespeichert ist, können Sie selbst belegen, indem Sie einen eigenen Text eingeben.

Wenn der Text zu lang ist, um auf der Taste angezeigt zu werden, wählen Sie die Funktion <Label ändern> und geben dort nur ein Stichwort als Merkhilfe ein. Wenn Sie auf der Taste ein Bild hinzufügen möchten, gelangen Sie mit der Funktion <Bild ändern> in das Bildarchiv des Talkers. Standardmäßig enthält der Talker im Modus „ABC-Programme“ keine Bilder. Um Bilder zu verwenden:

1. Erwerben Sie einen der optional erhältlichen Symbolsätze METACOM oder PCS.
2. Importieren Sie eigene Bilder in den Talker (siehe Handbuch).

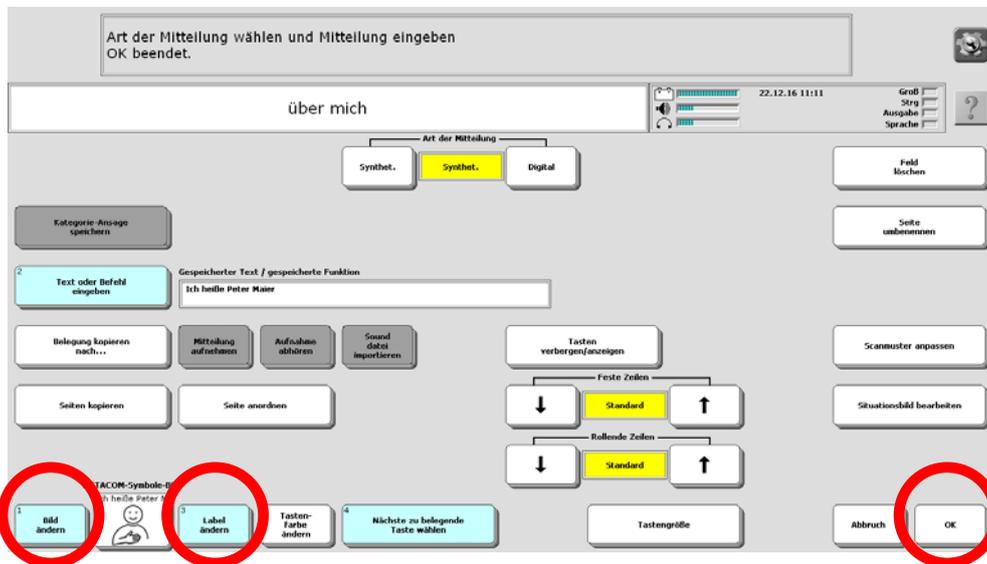

Nachdem Sie Ihre persönlichen Änderungen eingefügt haben, beenden Sie das Menü mit <OK> (unten rechts). Es erscheint wieder die Toolbox.

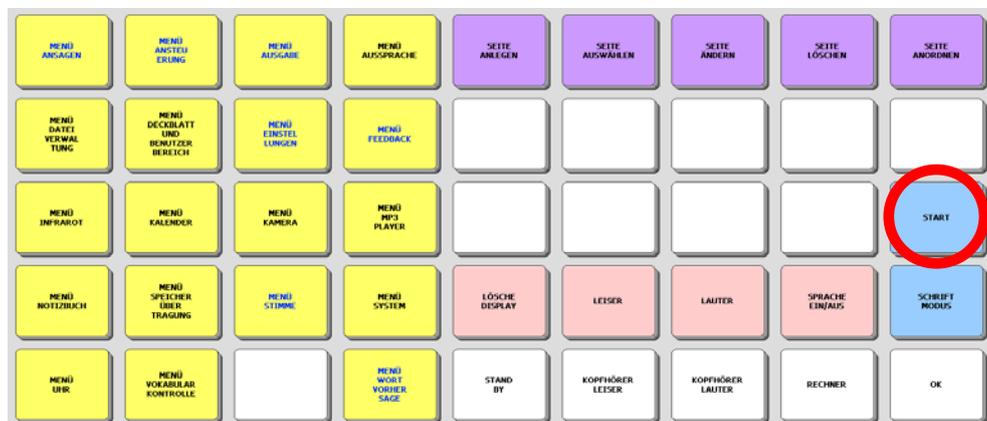

Die hellblaue Taste <START> bringt Sie zurück zur Ausgangsseite SCHRIFFT des Programms „ABC 50“.

Ausführliche Informationen zum Thema „Seiten“ entnehmen Sie bitte dem Heft „Das kleine Handbuch“, das Sie mit dem Talker erhalten haben, oder der Bedienungsanleitung im Kapitel „Das persönliche Deckblatt / Seiten“.

## Seiten ändern über die SETUP-Taste

Die Setup-Taste ermöglicht ein schnelles und intuitives Bearbeiten von Tasten ohne den „Umweg“ über die Toolbox.


1. Öffnen Sie die Seite, auf der Sie eine Aussage speichern oder bearbeiten wollen




2. Tippen Sie auf die Taste . Das Menü TOOLS wird angezeigt:

3. Tippen Sie auf die Taste .

4. Wählen Sie die zu bearbeitende Taste aus:

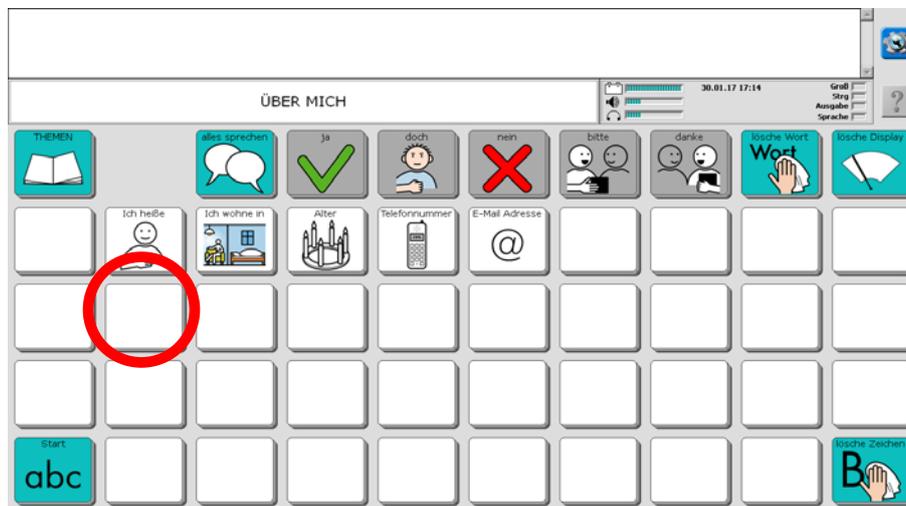

5. Geben Sie die Aussage ein. Wenn gewünscht, wählen Sie ein passendes Symbol.

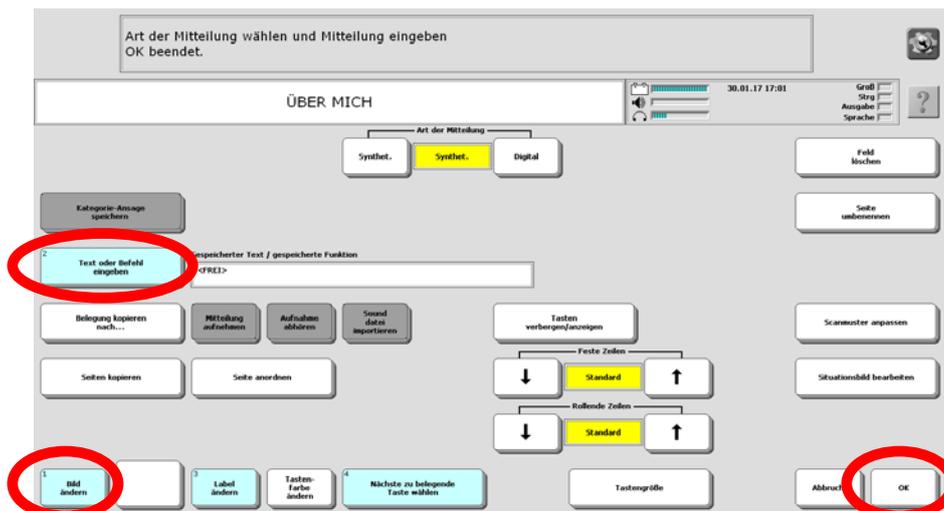

6. Drücken Sie zum Abschluss auf „OK“:

## Speichern von spontan erstellten Aussagen mit der Taste „Speichern“



Alle Themenseiten enthalten links oben eine Taste „Speichern“, mit der Sie den aktuell im Textfenster befindlichen Text auf einer Taste der aktuellen Seite speichern können.


Haben Sie z. B. eine Aussage formuliert, die Sie gerne aufheben möchten, weil Sie sie öfter verwenden wollen, können Sie sie mit Hilfe der Taste „Speichern“ bequem auf einer Seite Ihrer Wahl dauerhaft speichern.

Bis auf die Seiten „Meine Sätze 1“ und „Meine Sätze 2“ ist die Taste „Speichern“ zunächst ausgeblendet.

### Taste „Speichern“ sichtbar machen über die Toolbox

Öffnen Sie die Toolbox.


Drücken Sie die Taste SEITE ÄNDERN

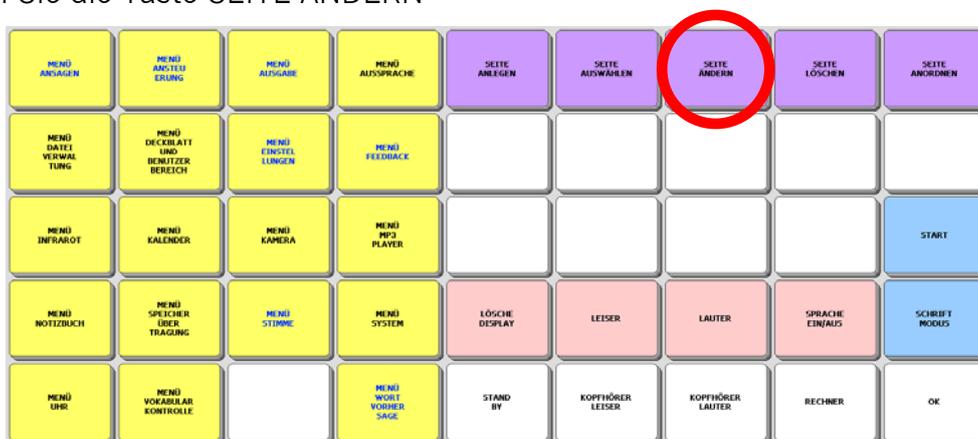


Wählen Sie die zu Seite aus, auf der Sie die Taste „Speichern“ sichtbar machen wollen, z. B. ÜBER MICH.




Im Display erscheint die Seite ÜBER MICH. Oben links im Textfenster steht die Aufforderung: „Taste auswählen“. Tippen Sie auf die Taste „Speichern“.

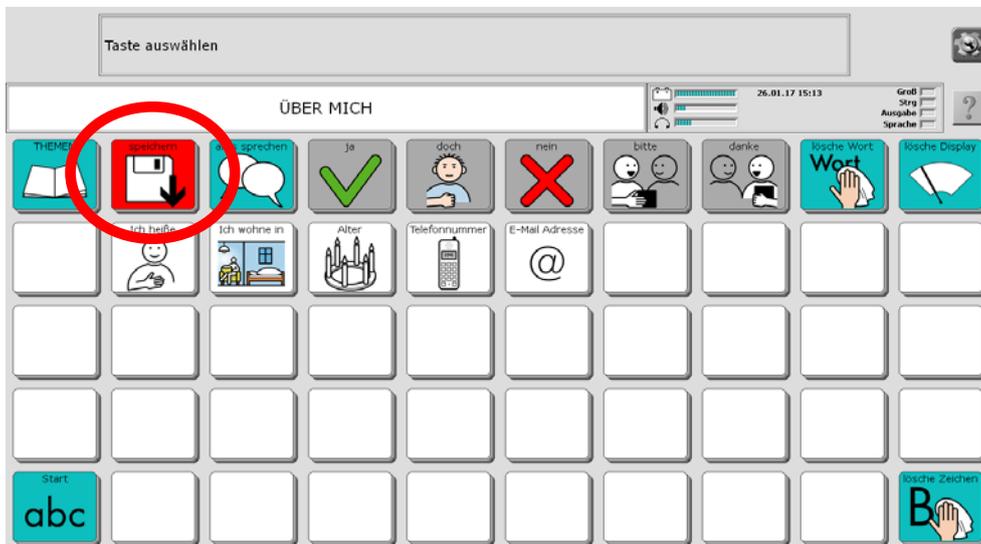



Wählen Sie die Option „Tasten verbergen/anzeigen“.

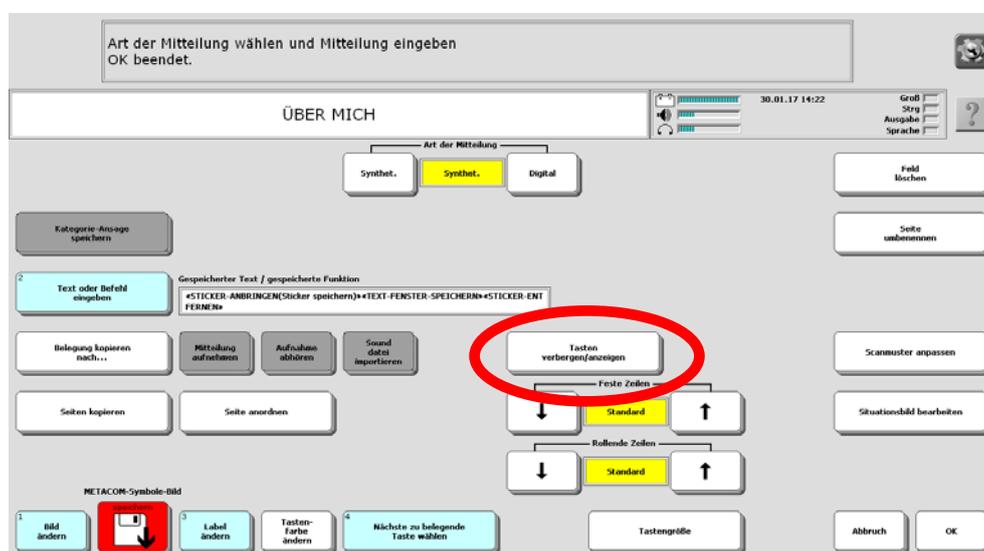

Die Seite wird angezeigt. Ausgeblendete Felder werden ausgegraut angezeigt.

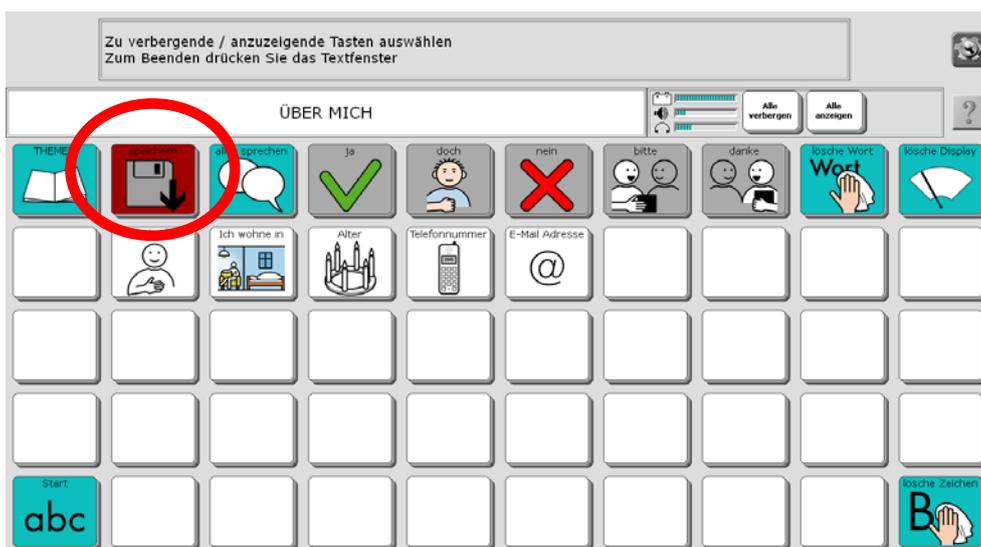

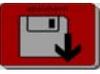
Tippen Sie auf die Taste „Speichern“ . Die Taste wird wieder „normal“ angezeigt.

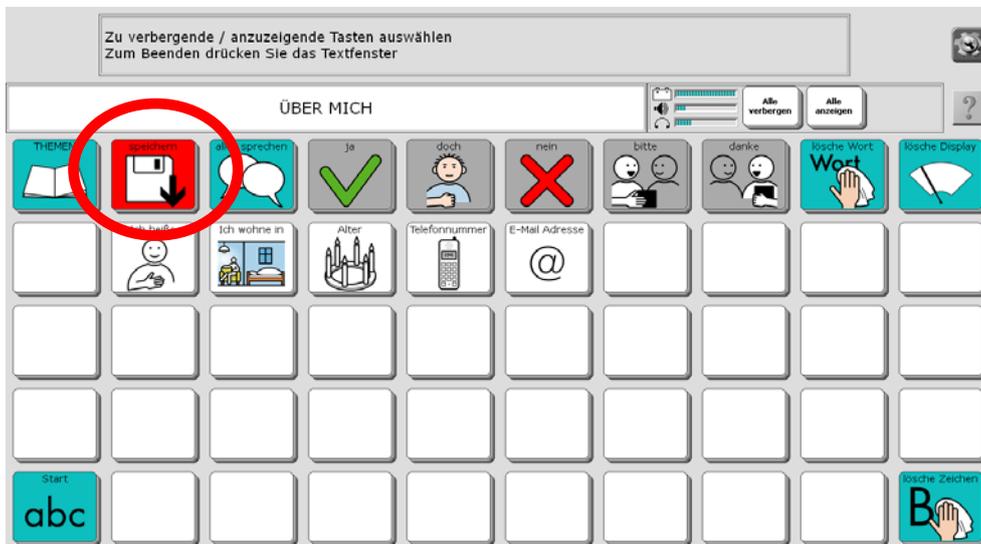


Tippen Sie oben in den grauen Bereich des Textfensters, um den Modus „Tasten verbergen / anzeigen“ zu beenden.



Tippen Sie auf „OK“, um das Bearbeiten der Seite zu beenden.

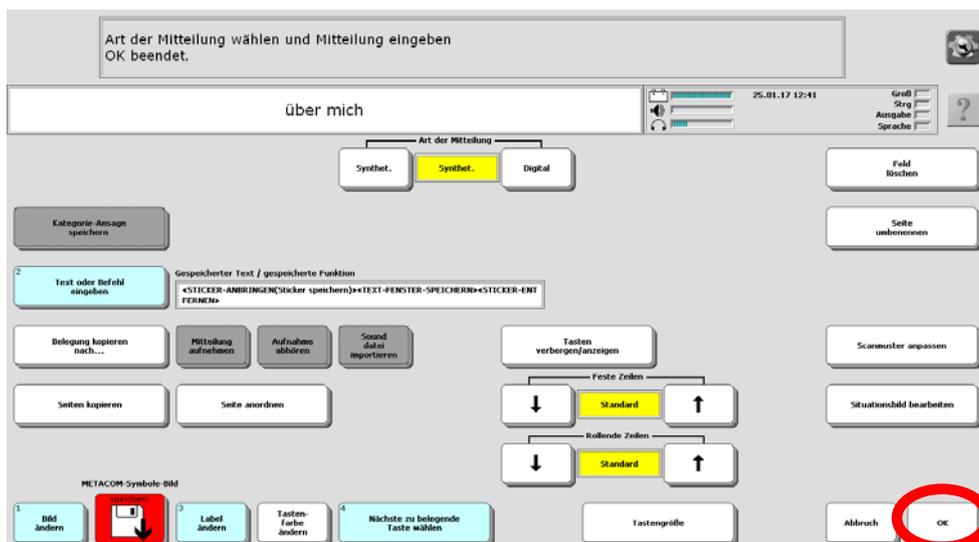

Schließen Sie die Toolbox durch Tippen auf „OK“.  
Die Taste „Speichern“ ist nun auf der Seite ÜBER MICH sichtbar:

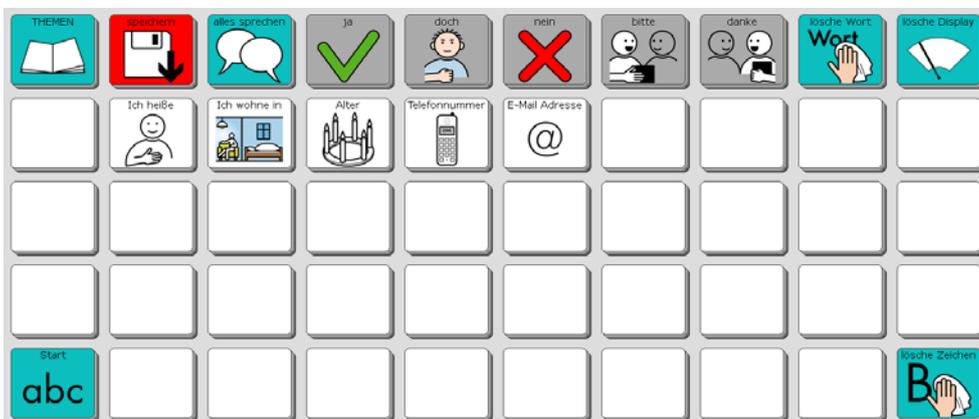

Verfahren Sie entsprechend mit allen Seiten, auf denen Sie die Taste „Speichern“ nutzen wollen.

## Taste „Speichern“ sichtbar machen über das Menü TOOLS

Die Taste „anzeigen/verbergen“ im Menü TOOLS ermöglicht ein schnelles und intuitives Sichtbarmachen von Tasten ohne den „Umweg“ über die Toolbox.


Öffnen Sie die Seite, auf der Sie eine Taste sichtbar machen oder verbergen wollen.




Tippen Sie auf die Taste . Das Menü TOOLS wird angezeigt:

Tippen Sie auf die Taste .

Im Display erscheint wieder die aktuelle Seite. Ausgeblendete Felder werden ausgegraut angezeigt.

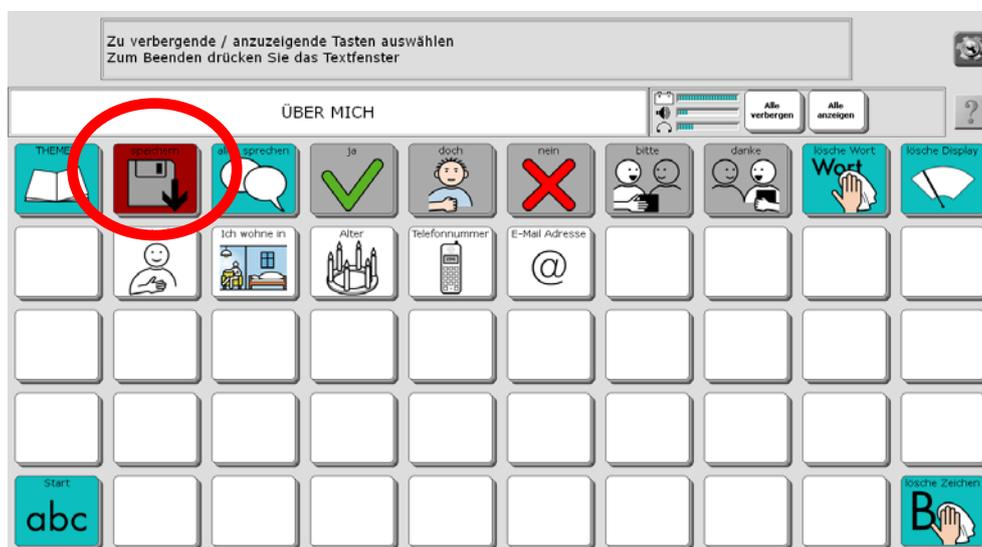


Tippen Sie auf die Taste „Speichern“ . Die Taste wird wieder „normal“ angezeigt.

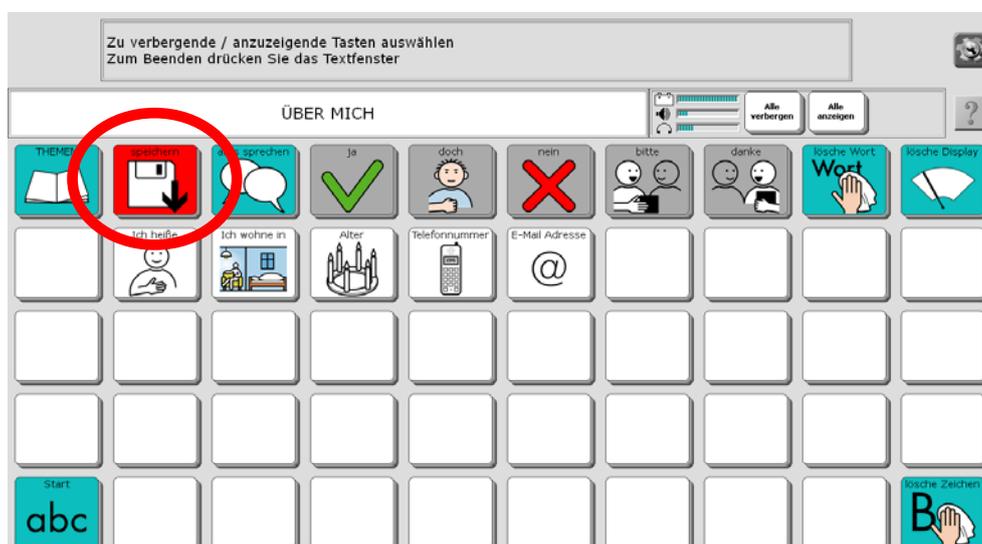


Tippen Sie oben in den grauen Bereich des Textfensters, um den Modus „Tasten verbergen / anzeigen“ zu beenden.

## Taste „Speichern“ benutzen


Formulieren Sie eine Aussage. Öffnen Sie anschließend über die Seite THEMEN die Themenseite, auf der Sie die Aussage dauerhaft speichern möchten (z. B. die Seite ÜBER MICH). Tippen Sie dort auf die Taste „Speichern“.

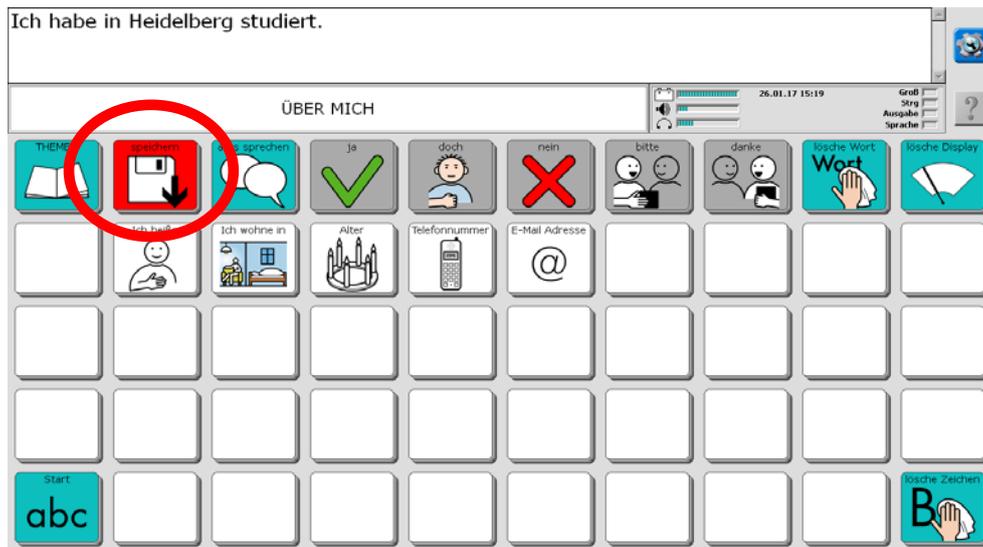

Wählen Sie die Taste aus, auf der die Aussage gespeichert werden soll. Wenn Sie eine bereits belegte Taste auswählen, wird der Inhalt der Taste überschrieben!

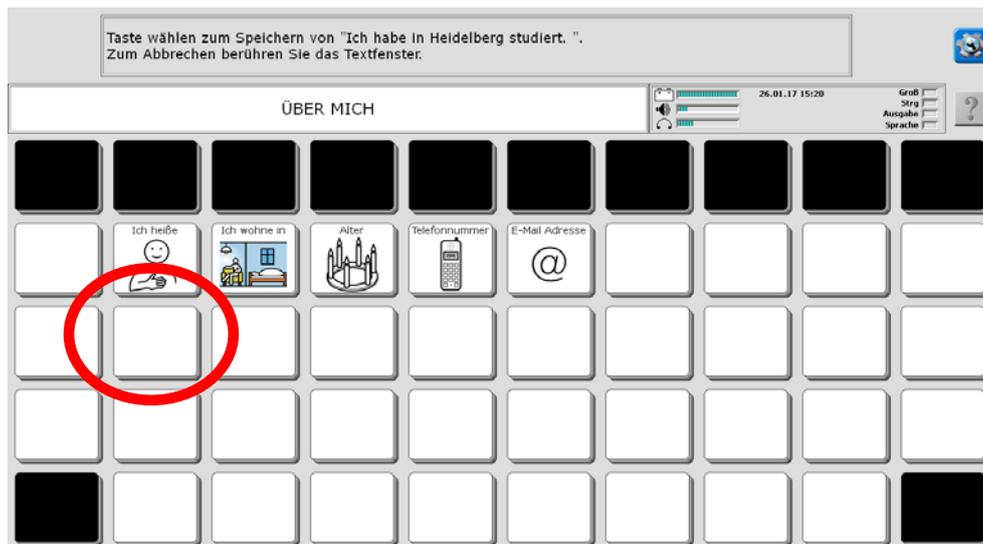


Die Aussage ist auf der Taste gespeichert.

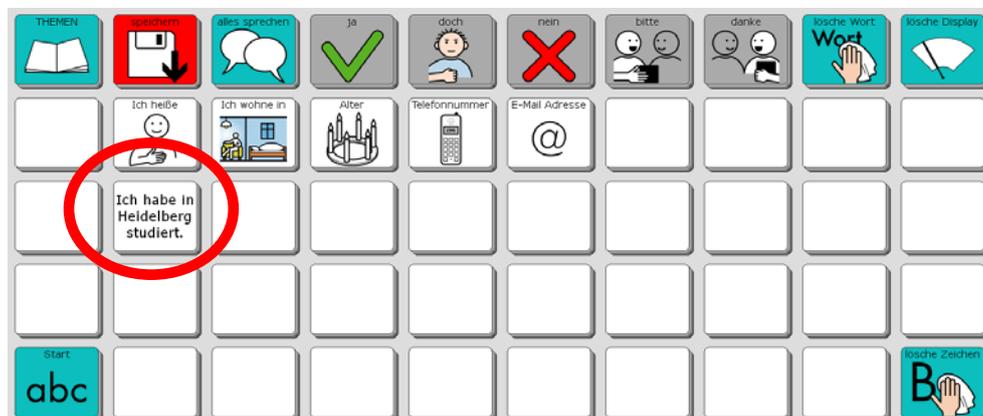

## Aussprache korrigieren

Besonders bei Namen von Personen und Orten kann es vorkommen, dass der Talker den Namen mit der synthetischen Stimme nicht so ausspricht, wie Sie es gerne hätten. In diesem Fall sollten Sie das betreffende Wort zum Aussprache-Lexikon hinzufügen, damit der Talker lernt, den Begriff richtig auszusprechen.

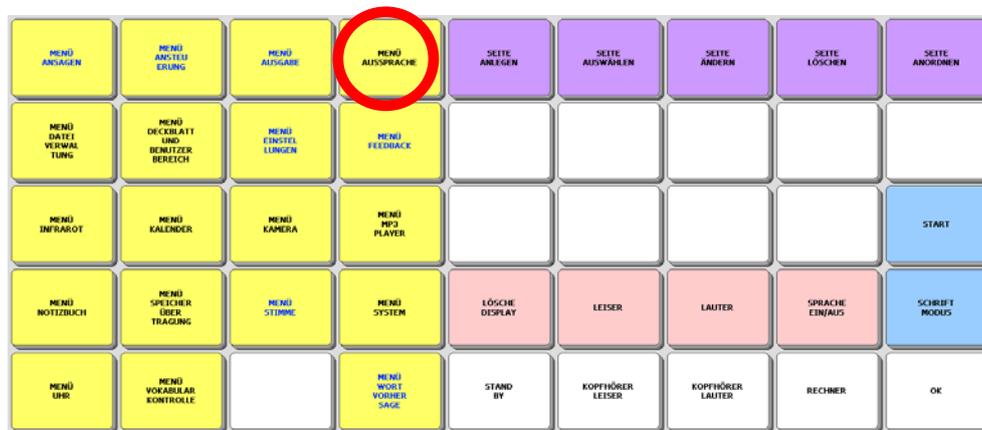

Wie Sie neue Wörter in das Aussprache-Lexikon einfügen können, entnehmen Sie bitte dem Heft „Das kleine Handbuch“, das Sie mit dem Talker erhalten haben.

## Besondere Funktionen des Talkers

Auf den Themenseiten INFRAROT, MEINE LIEDER, HANDY, TABLET, MAUS, PC FUNKTIONEN, NOTIZBUCH und FUNKTIONEN haben Sie Zugang zu besonderen Talkerfunktionen, die im Folgenden vorgestellt werden.


### Infrarot-Signale

Der Talker verfügt über eine eingebaute lernfähige Infrarot-Umfeldkontrolle. Das bedeutet, dass Sie mit dem Talker Ihre IR-fernbedienbaren Geräte steuern können, wenn Sie Ihr Gerät aus einer Liste geladen oder dem Talker die entsprechenden IR-Befehle beigebracht haben.

Bitte lesen Sie dazu die entsprechenden Abschnitte im Kapitel „Umfeldkontrolle“ in der Bedienungsanleitung.


Im Programm „ABC 50“ haben wir bereits Seiten angelegt, auf denen Sie die IR-Befehle für TV, Video, CD und Radio speichern können. Die Seiten zu den verschiedenen Geräten öffnen Sie von der INFRAROT-SEITE ausgehend.

### Die Seite INFRAROT

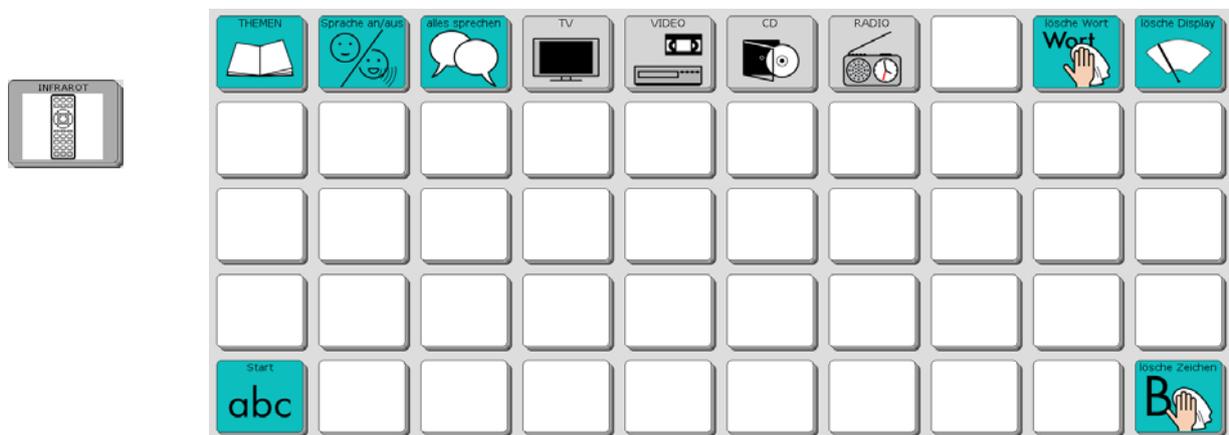


Diese Seite ermöglicht das Steuern von per Infrarot fernbedienbaren Haushaltsgeräten. Wählen Sie das Gerät, um die Seite mit den Befehlen angezeigt zu bekommen.

### Die Seite INFRAROT - TV

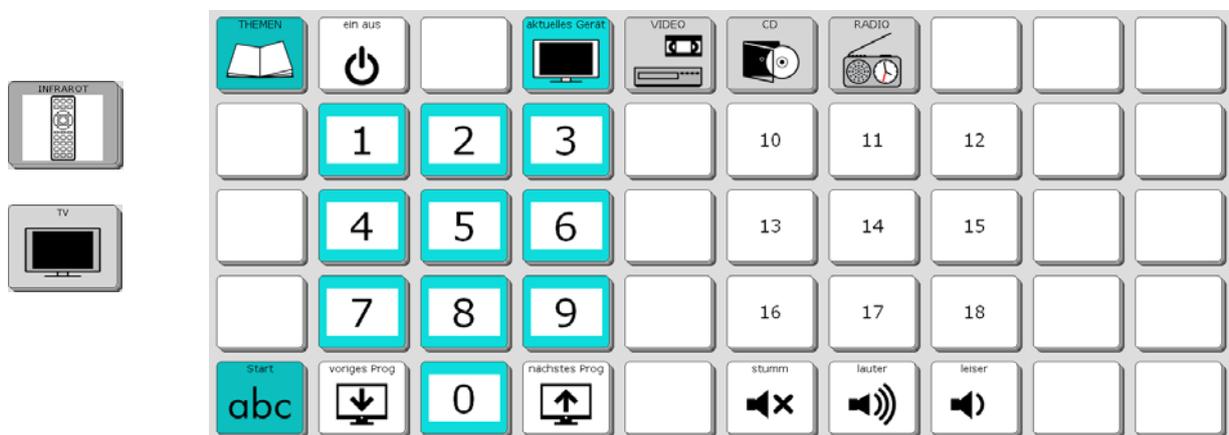

Diese Seite ermöglicht das Steuern eines per Infrarot fernbedienbaren Fernsehers.

## Die Seite INFRAROT - VIDEO

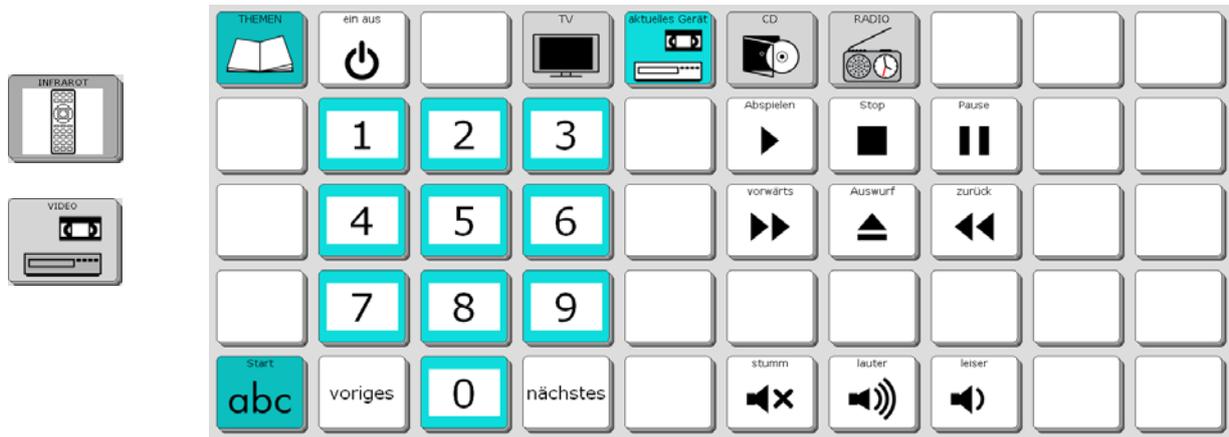

Diese Seite ermöglicht das Steuern eines per Infrarot fernbedienbaren Videorekorders.

## Die Seite INFRAROT - CD



Diese Seite ermöglicht das Steuern eines per Infrarot fernbedienbaren CD-Players.


## Die Seite INFRAROT - RADIO



Diese Seite ermöglicht das Steuern eines per Infrarot fernbedienbaren Radios.

## Die Seite MEINE LIEDER

Der Talker kann Audio-Dateien im Format MP3, WMA und WAV wiedergeben. Sie können einzelne Dateien entweder direkt auf der Seite MEINE LIEDER speichern oder sie mit Hilfe des Menüs MP3-PLAYER von einem USB-Stick oder einer SD-Karte lesen lassen.

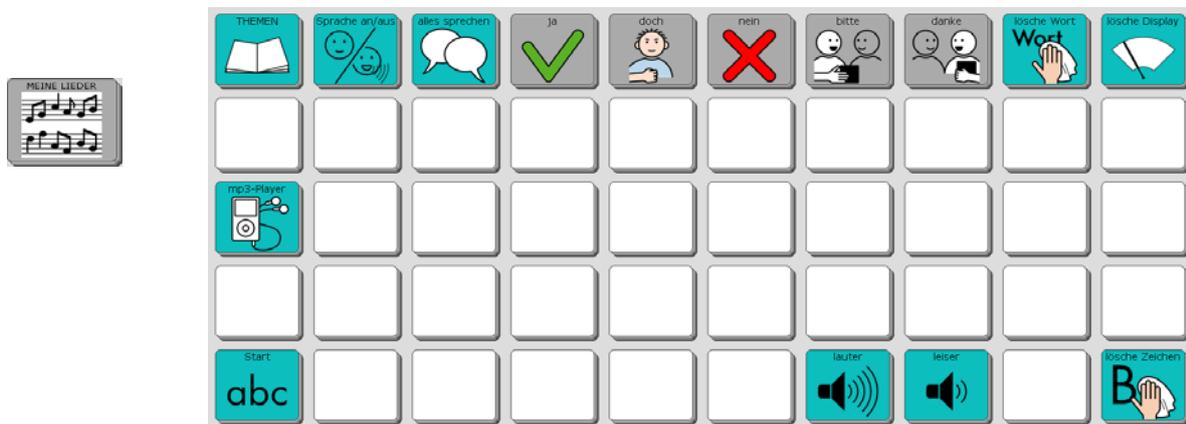


Um eine Musik-Datei direkt auf der Seite MEINE LIEDER zu speichern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. USB-Stick anschließen oder SD-Karte mit der oder den zu speichernden Datei(en) einlegen
2. Toolbox öffnen
3. SEITE ÄNDERN: Seite „MEINE LIEDER“ auswählen
4. Taste auswählen, auf der die Datei gespeichert werden soll
5. NAME ÄNDERN: z.B. Titel eingeben
6. ART DER MITTEILUNG: digital
7. SOUNDDATEI IMPORTIEREN: Datei auswählen
8. OK
9. START

Da Musik-Dateien viel Speicherplatz benötigen, empfehlen wir Ihnen, nur eine begrenzte Zahl von Liedern direkt auf der Seite MEINE LIEDER zu speichern und ansonsten das Menü MP3-PLAYER zur Wiedergabe von Sounddateien zu benutzen, die von einem externen Datenträger (USB-Stick, SD-Karte) wiedergegeben werden. Die Wiedergabe steuern Sie mit Hilfe des Menüs MP3-Wiedergabe, das Sie über die Taste




erreichen.

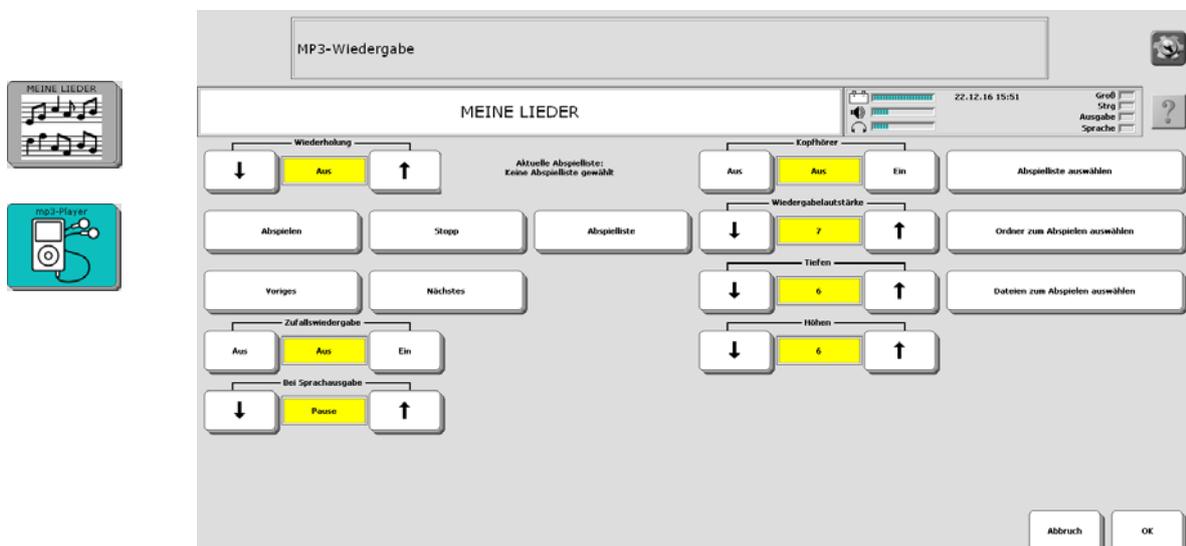

Lesen Sie dazu bitte das Kapitel „MP3-Player“ in der Bedienungsanleitung.


## Die Seite HANDY

Diese Seite ermöglicht das Steuern eines mittels Bluetooth gekoppelten Mobiltelefons oder Smartphones.

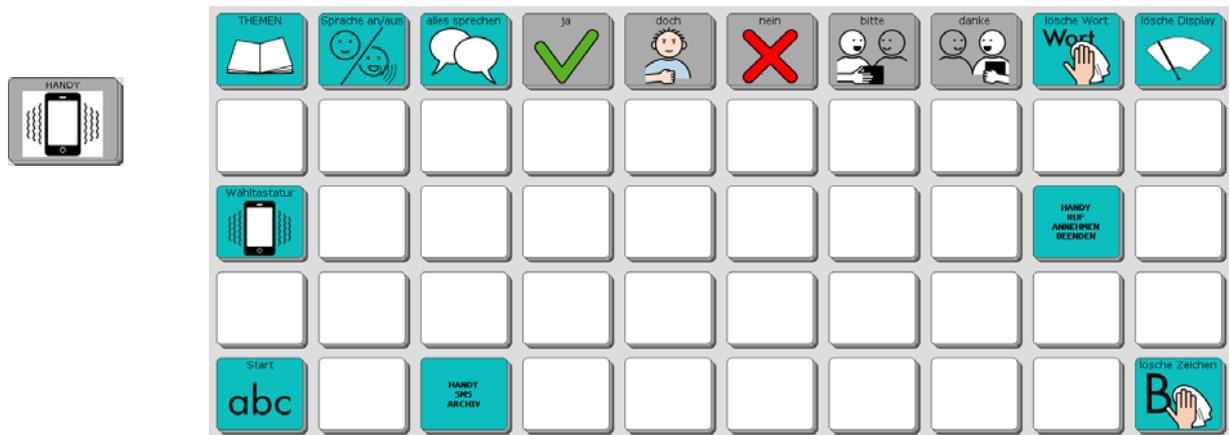

### Wähltastatur

Die Taste  öffnet das Menü „Wähltastatur“.

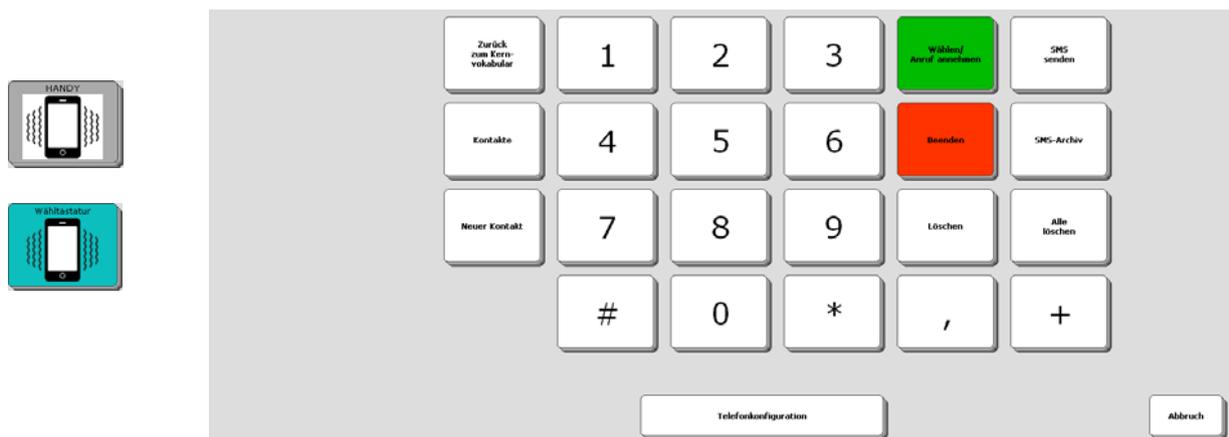

### Handy Ruf annehmen / beenden

Die Taste  dient zum Annehmen eines eingehenden Anrufs. Mit derselben Taste kann ein laufender Anruf auch wieder beendet werden.

### Handy SMS-Archiv

Bei geeigneten Mobiltelefonen und Smartphones hat der Accent Zugriff auf das SMS-


Archiv. Mit der Taste  können Sie das Archiv öffnen und eingegangene SMS lesen.

Ausführliche Informationen zum Thema Handysteuern mit dem Talker finden Sie in der Bedienungsanleitung im Kapitel „Handysteuern“.

Dort finden Sie auch Hinweise auf die jeweiligen Einstellungen für Bluetooth- oder USB-Verbindungen.

## Die Seite TABLET

Diese Seite ermöglicht das Steuern eines per Kabel oder Bluetooth gekoppelten Tabletcomputers.

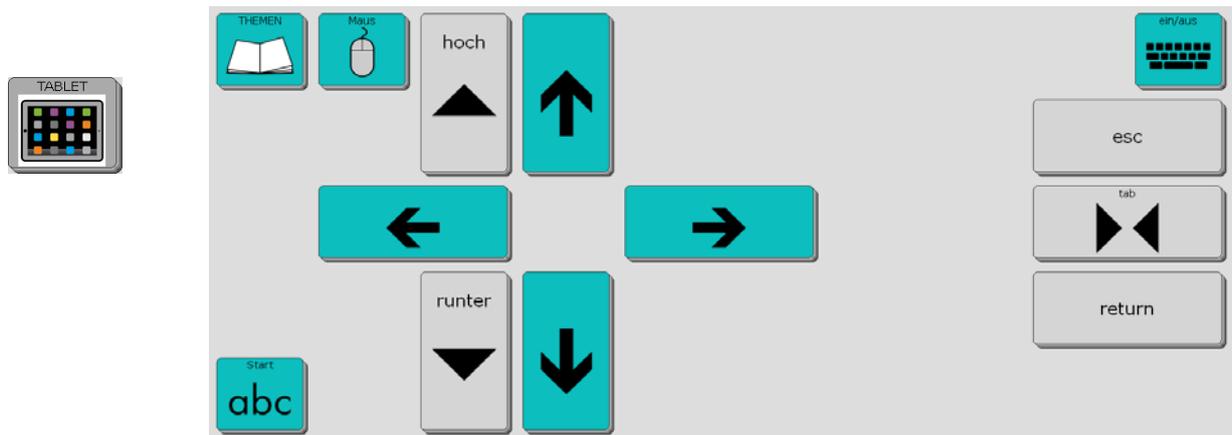

### Maus




Die Taste  öffnet die Seite zum Steuern des Mauszeigers (siehe Seite 73).

### Bild hoch / Bild runter



Die Tasten   entsprechen den Tasten „Bild hoch“ und „Bild runter“ der PC-Tastatur.

### Links / rechts / hoch / runter

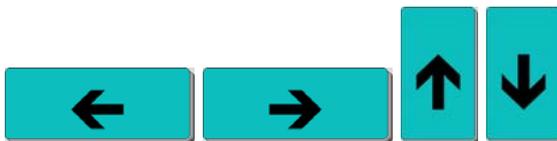

Die Tasten     entsprechen den Pfeiltasten der PC-Tastatur.

### Ein / aus



Die Taste  schaltet die Ausgabe aus bzw. wieder ein.

### Esc



Die Taste  entspricht der Taste „Esc“ der PC-Tastatur.

### Tab




Die Taste  entspricht der Taste „Tab“ der PC-Tastatur.


### Return




Die Taste  entspricht der Eingabetaste der PC-Tastatur.

## Die Seite MAUS

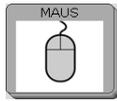

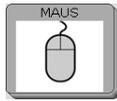Die Taste  öffnet die Seite mit Tasten zum Steuern des Mauszeigers.

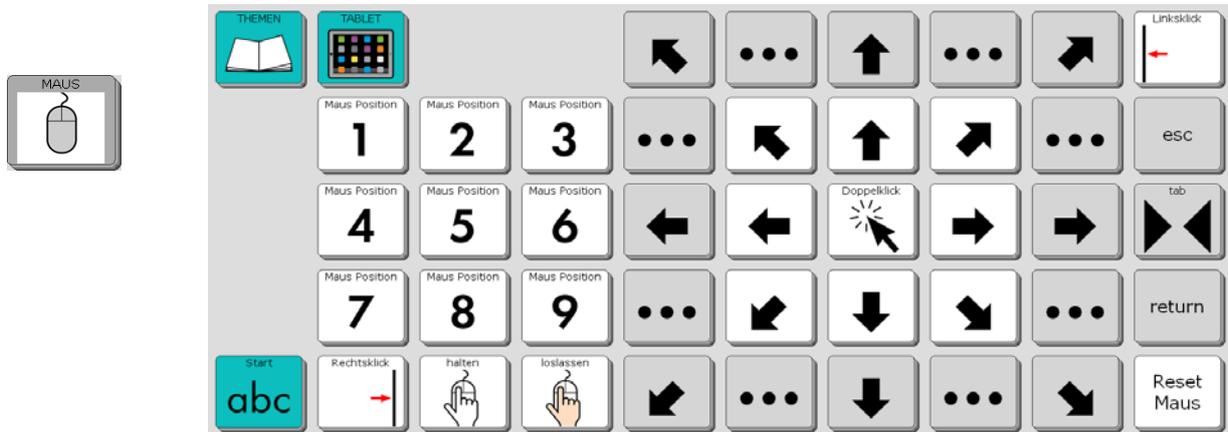


## Tablet




Die Taste  öffnet die Seite zum Steuern eines Tabletcomputers (siehe Seite 72).


## Mausposition 1...9

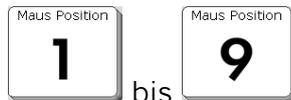

Diese Tasten  bis  positionieren den Mauszeiger an absoluten Positionen oben links, oben Mitte, oben rechts, links Mitte, Mitte Mitte, rechts Mitte, unten links, unten Mitte bzw. unten rechts.

## Pfeiltasten

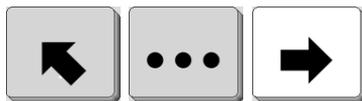

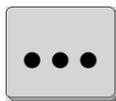
Die Pfeiltasten    bewegen den Mauszeiger relativ zur aktuellen Position in Pfeilrichtung. Die Pfeile auf weißem Hintergrund stehen für kleine Schritte, die auf grauem Hintergrund für größere Schritte.


## Doppelklick




Die Taste  führt einen Doppelklick der linken Maustaste an der aktuellen Mauszeigerposition aus.


## Linksklick

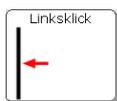

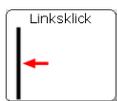Die Taste  führt einen einfachen Klick der linken Maustaste an der aktuellen Mauszeigerposition aus.

## Rechtsklick

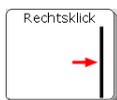

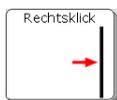Die Taste  führt einen einfachen Klick der rechten Maustaste an der aktuellen Mauszeigerposition aus.

## Halten



Die Taste  hält die linke Maustaste an der aktuellen Mauszeigerposition gedrückt.

## Loslassen



Die Taste  löst die linke Maustaste an der aktuellen Mauszeigerposition.

## Reset Maus



Die Taste  löst alle evtl. gehaltenen Maustasten.

## Esc



Die Taste  entspricht der Taste „Esc“ der PC-Tastatur.

## Tab



Die Taste  entspricht der Taste „Tab“ der PC-Tastatur.

## Return



Die Taste  entspricht der Eingabetaste der PC-Tastatur.

## Die Seite PC FUNKTIONEN



Die Taste  öffnet die Seite mit Tasten zum Steuern eines per Kabel oder Bluetooth verbundenen PCs.



### Bild hoch / Bild runter



Die Tasten  bis  entsprechen den Funktionstasten der PC-Tastatur.

### Strg



Die Taste  entspricht der Taste „Strg“ der PC-Tastatur.

### Windows



Die Taste  entspricht der Windows-Taste der PC-Tastatur.

### Alt



Die Taste  entspricht der Taste „Alt“ der PC-Tastatur.

### Ein / aus



Die Taste  schaltet die Ausgabe aus bzw. wieder ein.

### Esc



Die Taste  entspricht der Taste „Esc“ der PC-Tastatur.

### Tab




Die Taste  entspricht der Taste „Tab“ der PC-Tastatur.

### Return




Die Taste  entspricht der Eingabetaste der PC-Tastatur.

## Die Seite NOTIZBUCH

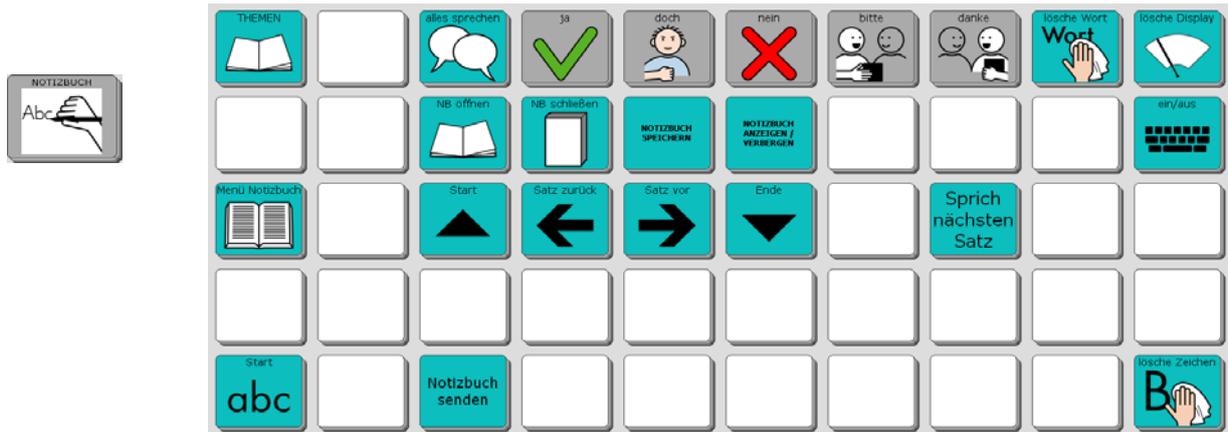

Wenn Sie längere Texte verwalten möchten, können Sie dafür die NOTIZBUCH-Funktionen des Talkers benutzen. Ein geöffnetes Notizbuch erkennen Sie am gelb hinterlegten Textfenster. Alles, was Sie in ein Notizbuch schreiben, bleibt erhalten.

## Menü Notizbuch

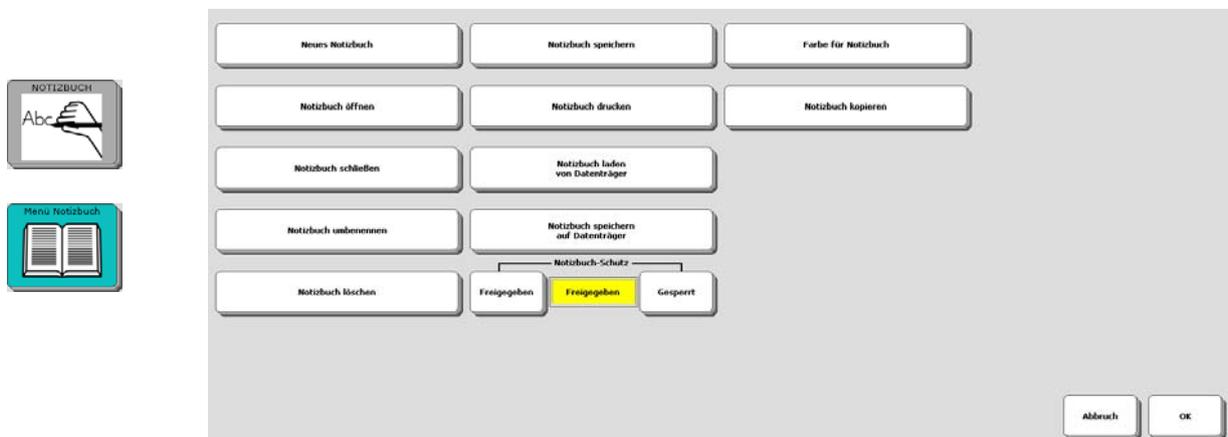


Die Taste „Menü Notizbuch“ öffnet das Talker-Menü NOTIZBUCH mit allen Optionen.


## Notizbuch öffnen



Die Taste „Menü Notizbuch“ öffnet die Übersicht aller angelegter Notizbücher. Tippen Sie auf ein Notizbuch, um es zu öffnen.

## Notizbuch schließen

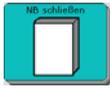

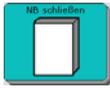Die Taste  schließt das aktuell geöffnete Notizbuch wieder. Alle Ihre Änderungen werden automatisch gesichert.

## Notizbuch speichern



Die Taste  dient zum Speichern des aktuellen Notizbuches, ohne es zu schließen.

## Notizbuch anzeigen/verbergen



Die Taste  dient zum Verbergen des aktuellen Notizbuches. Es bleibt im Hintergrund geöffnet. Wählen Sie erneut „Notizbuch anzeigen/verbergen“, um ein im Hintergrund geöffnetes Notizbuch wieder in den Vordergrund zu bringen.

## Start



Die Taste  positioniert den Cursor an den Anfang des Notizbuches.

## Satz zurück



Die Taste  positioniert den Cursor an den Anfang des Satzes / des vorigen Satzes.

## Satz vor



Die Taste  positioniert den Cursor an das Ende des Satzes / den Anfang des nächsten Satzes.

## Ende



Die Taste  positioniert den Cursor an das Ende des Notizbuches.

## Sprich nächsten Satz



Die Taste  spricht den Satz des Notizbuches, in dem der Cursor gerade steht. Jede erneute Auswahl dieser Taste spricht einen weiteren Satz.

## Notizbuch senden




Die Taste  sendet das Notizbuch an das im Menü AUSGABE eingestellte Gerät (siehe Menü AUSGABE im NuVoice-Handbuch).

## Ein/aus



Die Taste  schaltet die Ausgabe aus bzw. wieder ein (siehe Menü AUSGABE im NuVoice-Handbuch).

## Die Seite FUNKTIONEN

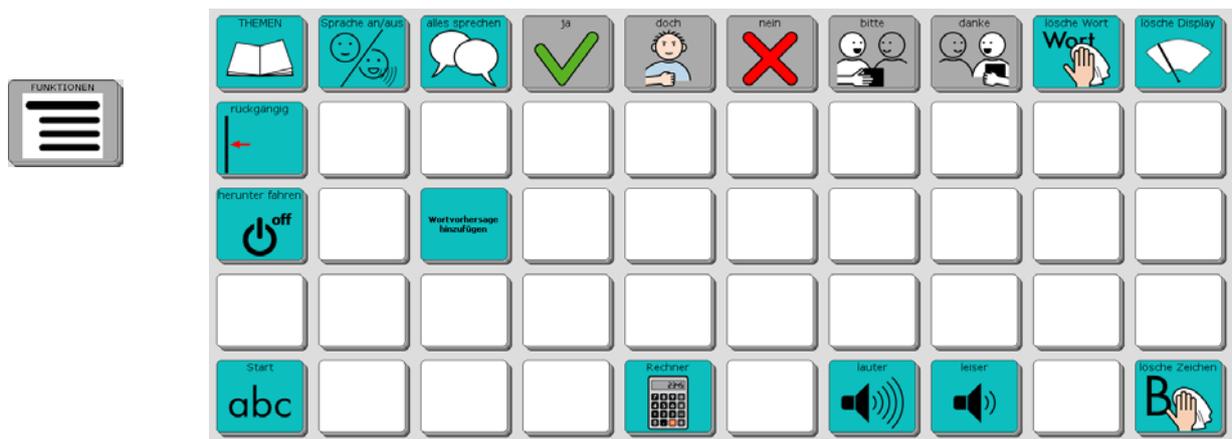

Diese Seite ermöglicht Zugriff auf wichtige Talker-Funktionen und den Taschenrechner.

### Sprache an/aus



Die Taste  schaltet die Sprachausgabe aus bzw. wieder ein. Bei ausgeschalteter Sprachausgabe spricht der Talker nur, wenn Sie auf das Textfenster tippen. Den aktuellen Zustand erkennen Sie in der Statuszeile des Displays.



Sprachausgabe ist eingeschaltet



Sprachausgabe ist ausgeschaltet

### Alles sprechen



Tippen Sie auf die Taste , um den gesamten Inhalt des Textfensters sprechen zu lassen.

### Rückgängig



Die Taste  macht die letzte Aktion rückgängig. Falls Sie versehentlich etwas gelöscht haben das Sie nicht löschen wollten, können Sie den Löschvorgang mit dieser Taste wieder ungeschehen machen.

Es kann nur der zuletzt getätigte Befehl rückgängig gemacht werden.

Kopieren Sie die Taste auf die Schriftseite und andere Seiten, auf denen Sie sie benötigen.

### Herunterfahren



Die Taste  beendet NuVoice, fährt das Betriebssystem herunter und schaltet den Accent aus. Sie müssen das Herunterfahren bestätigen. Der Neustart des Accents kann bis zu 2 Minuten dauern.

### Wortvorhersage hinzufügen




Die Taste  erlaubt Ihnen das Hinzufügen eines Wortes zur Wortvorhersage. Es wird ohne Nachfrage das letzte im Textfenster enthaltene Wort hinzugefügt.

Nach dem Hinzufügen wird Ihnen das Wort automatisch vorgeschlagen und Sie brauchen es nicht jedes Mal komplett einzutippen.

## Rechner



Die Taste  auf der Seite FUNKTIONEN öffnet einen einfachen Taschenrechner. Das Ergebnis der Berechnung befindet sich in der Zwischenablage und kann mit dem Befehl EINFÜGEN in das Textfenster kopiert werden.

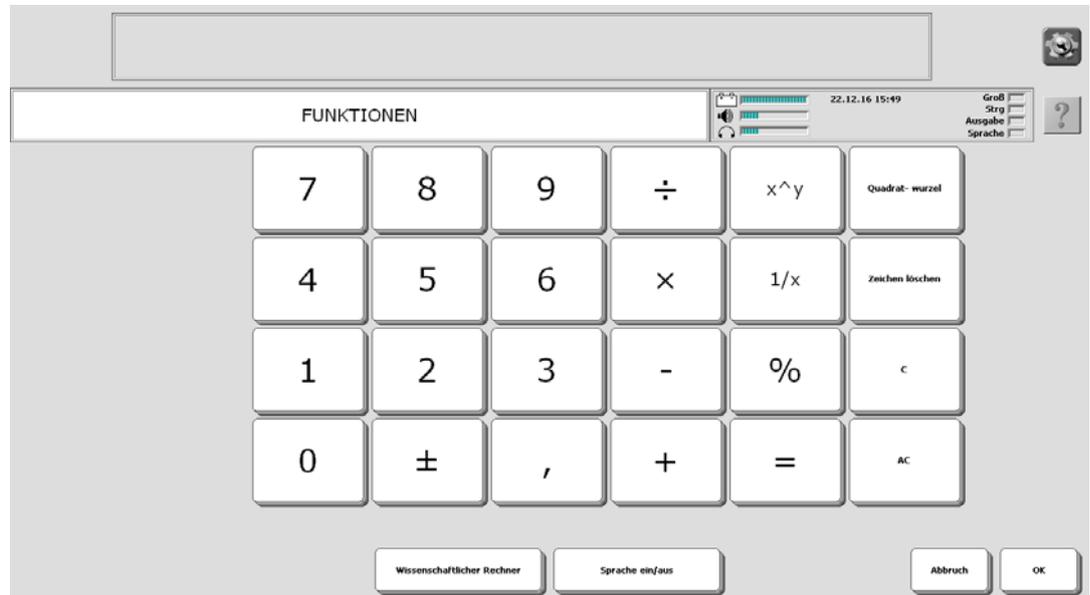

## Lauter



Die Taste  erhöht die Lautstärke der Sprachausgabe um eine Stufe.

## Leiser



Die Taste  reduziert die Lautstärke der Sprachausgabe um eine Stufe.


## Eine letzte Anregung: Speicherübertragung durchführen

Sichern Sie regelmäßig das „ABC 50“ -Programm mit Ihren persönlichen Änderungen, damit Sie im Falle eines Datenverlustes (auch der Talker ist ein Computer!) eine Sicherungskopie Ihres Vokabulars in das Gerät zurück laden können.


### Benutzerbereich sichern

Schließen Sie den mitgelieferten USB-Stick an den Talker an.


Öffnen Sie die Toolbox und wählen Sie das <MENÜ SPEICHERÜBERTRAGUNG>

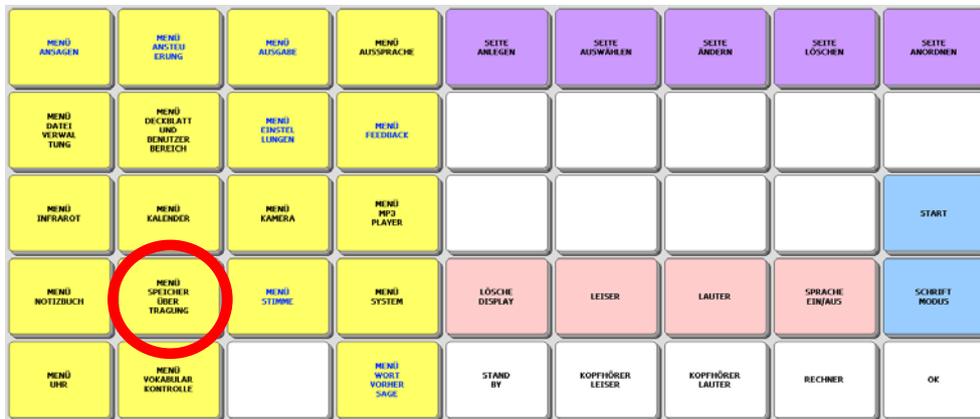


Tippen Sie auf das Feld <Benutzerbereich sichern>

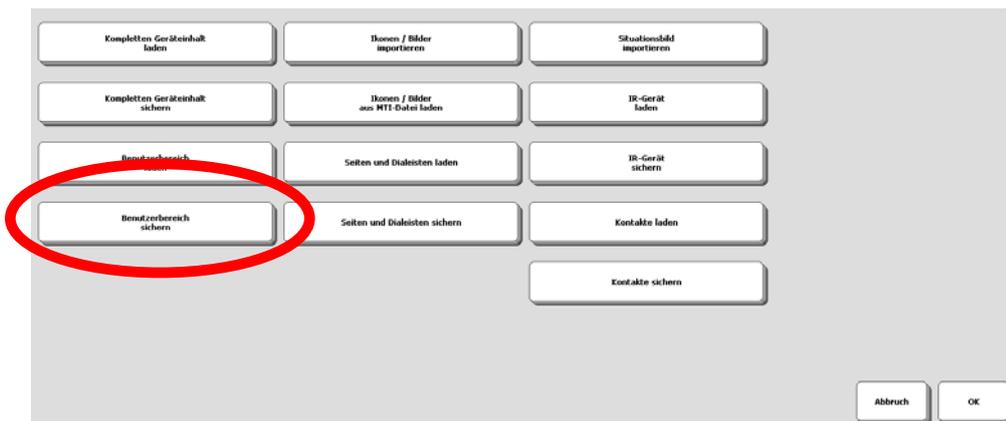

Wählen Sie den aktuellen Bereich als zu sichernden Bereich aus.

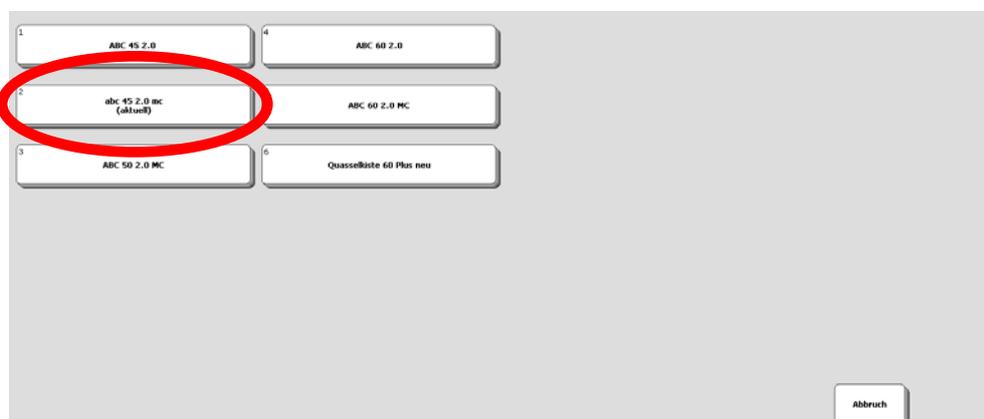


Wählen Sie den Ordner, in dem die Datei gespeichert werden soll.  
Geben Sie mit Hilfe der angezeigten Schrifttastatur einen Dateinamen ein

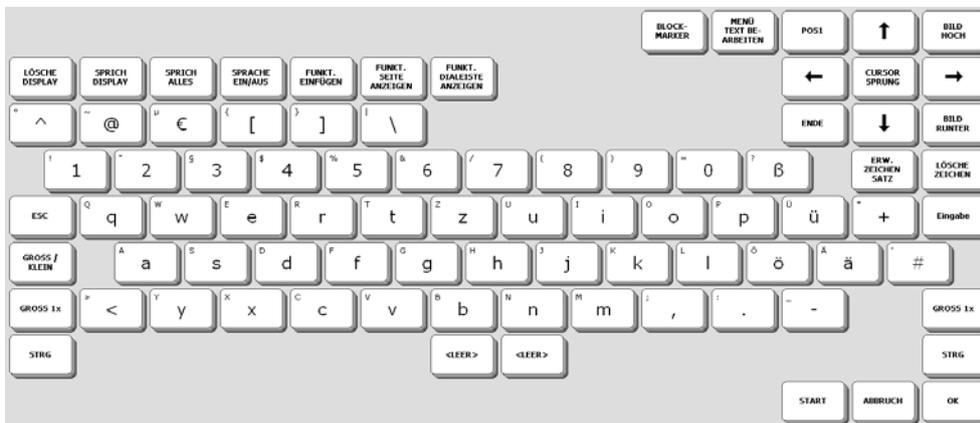

Bestätigen Sie die Eingabe mit <OK>.

Wenn die Speicherübertragung beendet ist, erscheint eine entsprechende Meldung im Display:

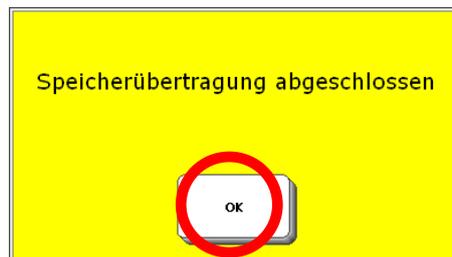

Drücken Sie <OK> im gelben Feld und danach zweimal <OK>, um das Menü zu beenden.

## **Benutzerbereich laden**

Wenn Sie eine Datei zurück in den Talker laden möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Haben Sie die Datei auf einem USB-Stick, so schließen Sie diesen an den Talker an.
2. Toolbox öffnen
3. <Menü Speicherübertragung>
4. <Benutzerbereich laden>
5. Benutzerbereich auswählen, in den die Datei geladen werden soll
6. Die im aktuellen Ordner vorhandenen Dateien werden angezeigt
7. Wechseln Sie ggf. zu dem Ordner, der die zu ladende Datei enthält.
8. Wählen Sie die zu ladende Datei aus.
9. Die Speicherübertragung wird durchgeführt.
10. Drücken Sie <OK> im gelben Feld und danach <OK>, um das Menü zu beenden.
11. <START> bringt Sie zurück zum Start des Programms.

**Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Talker!**

# ABC 60

## Version mit oder ohne Metacom-Symbole

Das Wortschatzprogramm „ABC 60“ gibt es in 2 Versionen, eines mit und eines ohne Metacom-Symbole. Die Version ohne Metacom-Symbole nutzt die mitgelieferten PRD-Symbole zur Kennzeichnung von Funktionstasten, die Version mit Metacom nutzt Metacom-Symbole.




ABC 60 ohne Metacom-Symbole

ABC 60 mit Metacom-Symbolen

Die im Folgenden gemachten Angaben gelten für beiden Versionen, auch wenn die Grafiken die Version ABC 60 mit Metacom-Symbolen zeigen.

## Die SCHRIFT-SEITE

Schalten Sie den Talker mit der Ein/Aus-Taste ein.  
Nach dem Startvorgang erscheint folgendes Bild im Display:

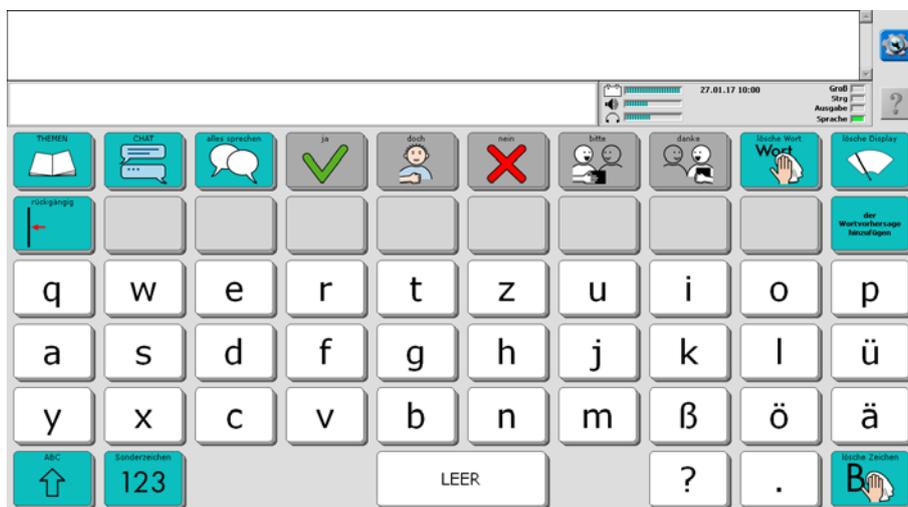

Die oberste Zeile, die im Augenblick noch leer ist, heißt Textfenster. Hier erscheinen im Folgenden die Buchstaben und Wörter, die Sie schreiben.

Die Buchstaben auf der SCHRIFT-SEITE sind gemäß der QWERTZ-Tastaturbelegung angeordnet, wie sie vom Computer her bekannt ist.

In den grauen Felder erscheinen die Vorschläge der Wortvorhersage, sobald Sie zu schreiben beginnen. Tippen Sie auf ein Feld, um einen Vorschlag zu übernehmen.

Sie können sofort mit dem Schreiben beginnen.



Tippen Sie z.B. nacheinander die einzelnen Buchstaben h a l l o und am Ende die Taste <leer> ganz oben links.

(Stören Sie sich bitte nicht daran, dass der Talker die einzelnen Buchstaben nicht laut ausspricht. Das liegt daran, dass die Sprache ausgeschaltet ist. Wie man die Sprachausgabe ein- und ausschalten kann, erfahren Sie bei den Erläuterungen zur THEMEN-SEITE weiter hinten in dieser Einführung.)

Im Textfenster in der oberen Zeile erscheint das Wort „hallo“.  
Tippen Sie auf das angezeigte Wort „hallo“, und der Talker spricht das ganze Wort.

## Grüne Funktionstasten

Auf der SCHRIFT-SEITE befinden sich auch einige grün unterlegte Tasten mit Funktionen, die beim Schreiben wichtig sind:

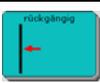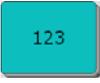Version mit META-COM-Symbolen	Version ohne META-COM-Symbole	
		Wechsel zur THEMEN-SEITE
		Wechsel zur CHAT-SEITE
		Inhalt des Textfensters wiedergeben (alternativ zum Tippen ins Textfenster)
		Wort löschen
		Inhalt des Textfensters löschen
		Die letzte Aktion rückgängig machen
		Fügt das zuletzt eingetippte Wort zur Wortvorhersage hinzu
		Wechsel zwischen Groß-, permanent Groß- und Kleinschreibung
		Wechsel zur ZEICHEN-SEITE
		Zeichen löschen

## Die ZEICHEN-SEITE

Drücken Sie auf der SCHRIFT-SEITE die Taste .

Die Anzeige im Display wechselt und Sie sehen nun die ZEICHEN-SEITE:



Die ZEICHEN-SEITE bleibt geöffnet, bis Sie sie manuell wieder schließen

Drücken Sie die Taste , um auf die THEMEN-SEITE zu gelangen.

Die Taste  schaltet die Sprachausgabe aus bzw. wieder ein.

Die Taste  bewegt den Cursor (die Schreibmarke) eine Stelle nach links.

Die Taste  bewegt den Cursor (die Schreibmarke) eine Stelle nach rechts.

Die Taste  bewegt den Cursor (die Schreibmarke) eine Zeile nach oben.

Die Taste  bewegt den Cursor (die Schreibmarke) eine Zeile nach unten.

Drücken Sie die Taste , um wieder auf die Startseite zu gelangen.

## Wortvorhersage


Der Talker verfügt über eine leistungsfähige Wortvorhersage, bestehend aus einer Wortvervollständigung des gerade eingegebenen Wortes und einer Vorhersage des nächsten Wortes.

Beim Schreiben erscheinen auf den grauen Tasten Wortvorschläge, die Sie durch direktes Antippen auswählen können, um den Schreibprozess abzukürzen.



Sie können neue Wörter ganz einfach über die Taste „Wortvorhersage hinzufügen“ (Seite SCHRIFT) zum Wortvorhersagelexikon hinzufügen (siehe Seite 84).

Ein- und Ausschalten sowie anpassen können Sie die Wortvorhersage über die Toolbox, Menü Wortvorhersage.

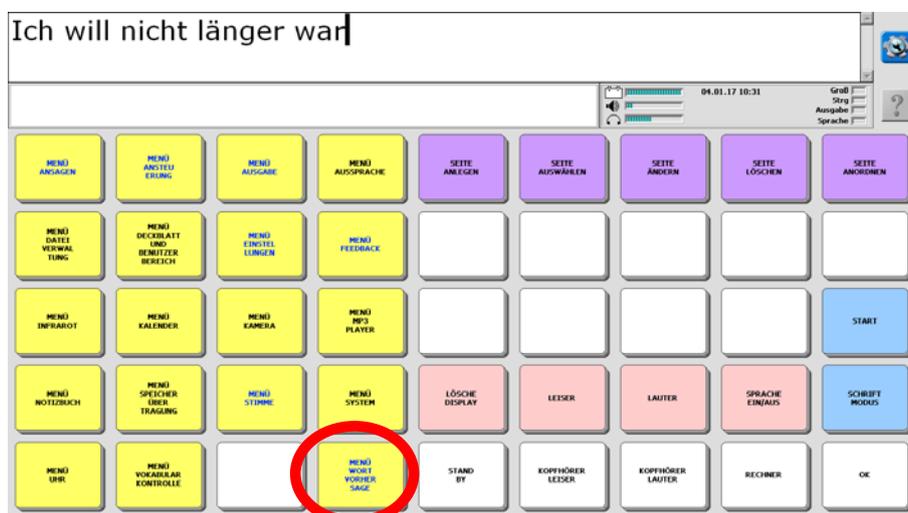

Weitere Informationen zur Wortvorhersage entnehmen Sie bitte dem NuVoice-Software-Manual und dem „Das kleine Handbuch“, welche Sie zusammen mit dem Talker erhalten haben.

## Die THEMEN-SEITEN

Zusätzlich zu den Möglichkeiten der Schrifteingabe bietet der Talker auch die Funktion, Wörter und Sätze, die man häufig benötigt, als Ganzes abzuspeichern, damit man sie nicht jedes Mal wieder schreiben muss.



Drücken Sie die Taste Themen  auf der SCHRIFT-SEITE.

Die Anzeige im Display wechselt und Sie sehen die THEMEN-SEITE:



Die hell hinterlegten Tasten öffnen Seiten zu verschiedenen Themenbereichen, die Sie individuell verändern können (weiter hinten in dieser Einführung wird die entsprechende Vorgehensweise erläutert). Auf den Tasten steht jeweils der Name der damit zu öffnenden Seite.

Die dunkel hinterlegten Tasten bieten Zugang zu speziellen Seiten zur Steuerung z.B. eines Tabletcomputers, eines Smartphones, einer Maus sowie zu wichtigen Gerätefunktionen.

Die grau hinterlegten Aussagen „ja“, „doch“, „nein“, „bitte“ und „danke“ in der oberen Zeile sind auf allen Themenseiten zu finden. **Bei allen grau hinterlegten Tasten gilt: Die Tasten dienen dem Kommentieren, der jeweilige Inhalt wird nicht im Textfenster angezeigt!**



Zurück zur THEMEN-Auswahlseite



Wechsel zurück zur SCHRIFT-SEITE



Schaltet die Sprachausgabe aus bzw. wieder ein



Der Inhalt des Textfensters wird wiedergegeben



Löscht das letzte Wort im Textfenster.



Löscht den gesamten Inhalt des Textfensters.



Löscht den zuletzt eingegebenen Buchstaben im Textfenster.

Im Folgenden sind alle Themenseiten abgebildet.

## Die Seite ÜBER MICH



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
	Ich heiße	Ich wohne in	Alter	Telefonnummer	e-mail Adresse				
Start	abc								lösche Zeichen

## Die Seite FRAGEN



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
	Was ist das?	Was gibt es Neues?							
	Wann wieder?	Was gestern?	Wie geht es dir?						
	Wie viel?								
Start	abc								lösche Zeichen

## Die Seite ORTE



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
	Apothek	Bäcker	Bahnhof	Bank	Geschäft	Kino	Kiosk		
	Kirche	Markt	Metzger	Park	Post	Supermarkt	Tankstelle		
Start	abc								lösche Zeichen

## Die Seite ESSEN



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
Start	Hunger	wann?	was?	etwas anderes	das reicht	schlecht	darf nicht		lösche Zeichen
abc									B

## Die Seite TRINKEN



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
Start	Durst	helfen	was?	etwas anderes	das reicht	schlecht	darf nicht		lösche Zeichen
abc									B

## Die Seite SÄTZE



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
Start									lösche Zeichen
abc									B

## Die Seite NAMEN



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
Start	Wie heißt du?	Wie heißen Sie?							lösche Zeichen
abc									B

## Die Seite WOHLFÜHLEN



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
Start	langweilig	so ist es gut	nicht richtig						lösche Zeichen
abc									B

## Die Seite MEDIZIN



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
Start	neues Rezept	brauche Hilfe	Arzt sprechen	verstanden	nicht verstanden	Wann wiederssehen?			lösche Zeichen
abc									B

## Die Seite ZEIT



Mit der Tasche geben Sie das aktuelle Datum aus.



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	Minute	Stunde
Datum	23							Uhr	Tag
	1	2	3	4	5	6		Woche	Wochenende
	7	8	9	10	11	12		früh	spät
		gestern	heute	morgen	vor	nach	Monat	Jahr	
Start	abc			LEER					lösche Zeichen
									B

## Die Seite FLOSKELN



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
	Hallo!	Guten Tag!	Tschüss!	Auf Wiedersehen!		Moin!	Grüß Gott!		
	Glückwunsch!	Alles Gute!	Entschuldigung!	Fröhliche Weihnachten!					
Start	abc								lösche Zeichen
									B

## Die Seite FAMILIE



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
	Enkel	Sohn	Vater	Opa	Bruder	Schwigersohn			
	Enkelin	Tochter	Mutter	Oma	Schwester	Schwiegertochter			
Start	abc								lösche Zeichen
									B

## Die Seite KLEIDUNG



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
Start	Aussehen?	Wie Wetter?	Anschauen!						lösche Zeichen
abc									B

## Die Seite PFLEGE



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
	Zähne putzen	waschen	duschen	baden					
Start	Türe zur	Hilfe!	Toilette!						lösche Zeichen
abc									B

## Die Seite KÖRPER



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
Start	möchte legen	Hilfe!	Jucken!	Schmerzen!	Übelkeit!				lösche Zeichen
abc									B

## Die Seite MEINE SÄTZE 1



Themen	Text speichern	alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
Start abc									lösche Zeichen B

## Die Seite MEINE SÄTZE 2



Themen	Text speichern	alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
Start abc									lösche Zeichen B

## Die Seite LEUTE



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
	Besucher	Nachbar							
	Frau	Mann							
	Mädchen	Junge	Kind						
	Krankenschwester	Pfleger							
Start abc									lösche Zeichen B

## Die Seite TELEFON



THEMEN		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
	Hallo!	Tschüs!							
	Hier spricht	Sprach Computer	Bitte ja/nein-Fragen stellen	Moment bitte, ich schreibe		Ihre Handy Nummer	Ihre Tel. Nummer		
	Bitte wiederholen Sie	Bitte erklären	Ich habe nicht verstanden	Ich habe verstanden		Meine Handy Nummer	Meine Tel. Nummer		
	Wie ist Ihr Name								
Start abc	Bitte später wieder anrufen								lösche Zeichen B

## Die Seite CHAT



THEMEN	Sprache an/aus	alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
		ja/nein Frage		Moment		nochmal fragen			
Start abc									lösche Zeichen B

## Die Seite WICHTIG 1



Start abc				

## Die Seite WICHTIG 2



Start abc				

## Die Seite FREI 1



Themen	alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
Start abc								lösche Zeichen B

## Die Seite FREI 2



Themen	alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
Start abc								lösche Zeichen B

## Die Seite FREI 3

FREI  
**3**

Themen		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
Start abc									lösche Zeichen B

## Die Seite FREI 4

FREI  
**4**

Themen		alles sprechen	ja	doch	nein	bitte	danke	lösche Wort	lösche Display
Start abc									lösche Zeichen B

## Eigene Änderungen einfügen

Bevor wir zu den Sonderfunktionen in der unteren Zeile der THEMEN-SEITE kommen, erfahren Sie, wie Sie eigene Änderungen in das Programm „ABC 60“ einfügen können.


## Seiten ändern über die Toolbox

Das Programm „ABC 60“ ist aus einzelnen Seiten zusammengesetzt. Um Änderungen vorzunehmen, werden Sie hauptsächlich die lila Tasten in der oberen Reihe der Toolbox benötigen.


Wie Sie Seiten ändern können, wird im Folgenden Schritt für Schritt am Beispiel der Seite ÜBER MICH erläutert:

Öffnen Sie die Toolbox.


Drücken Sie die Taste SEITE ÄNDERN

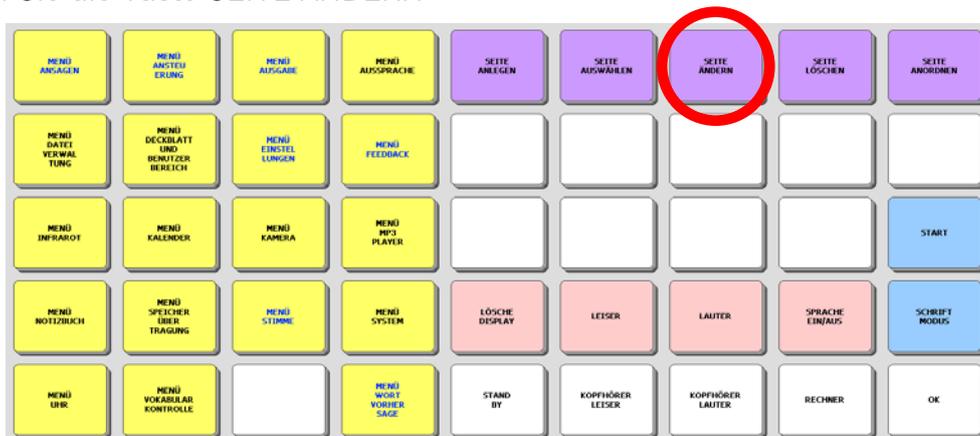

Wählen Sie die zu ändernde Seite aus: ÜBER MICH

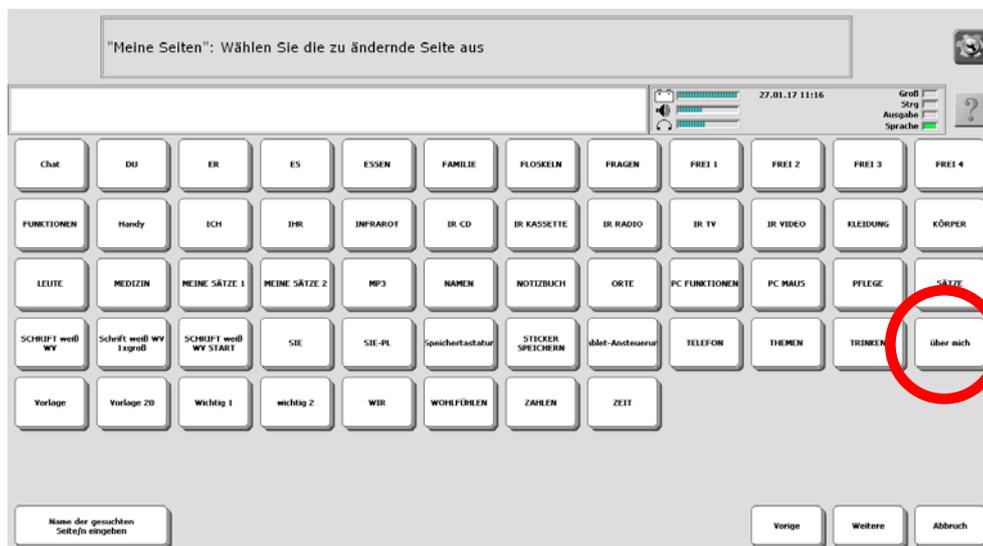


Im Display erscheint die Seite ÜBER MICH. Oben links im Textfenster steht die Aufforderung: „Taste auswählen“.

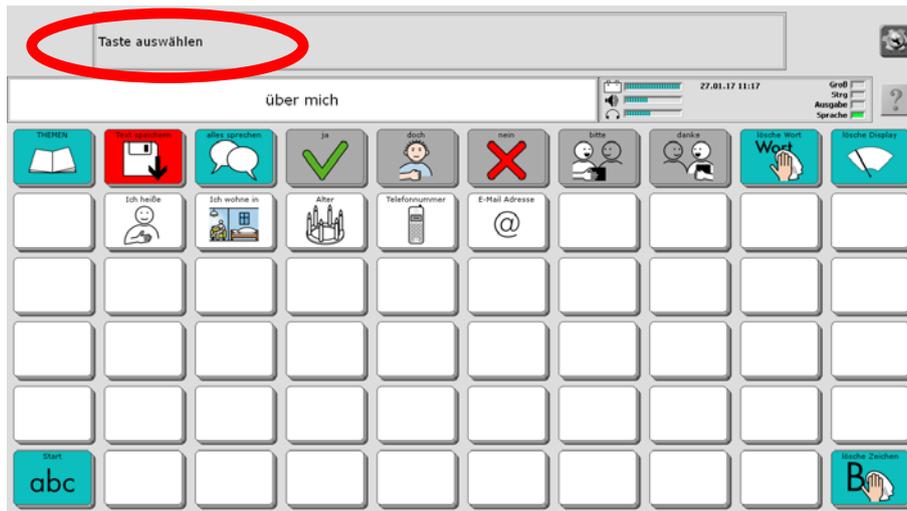


Ändern Sie die für Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihr Alter und Ihre Telefonnummer vorbereiteten Tasten.

Wählen Sie die Taste „Ich heiße“. Sie sehen folgende Anzeige:

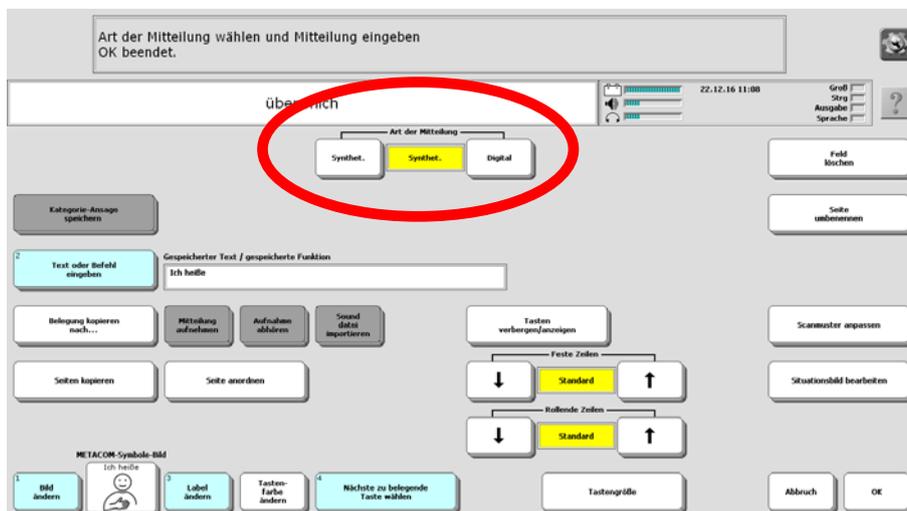


Im gelben Feld oben in der Mitte steht für „Art der Mitteilung = synthet.“. Das bedeutet, dass die Mitteilung mit der Computerstimme des Talkers gesprochen wird.

Darunter sehen Sie:

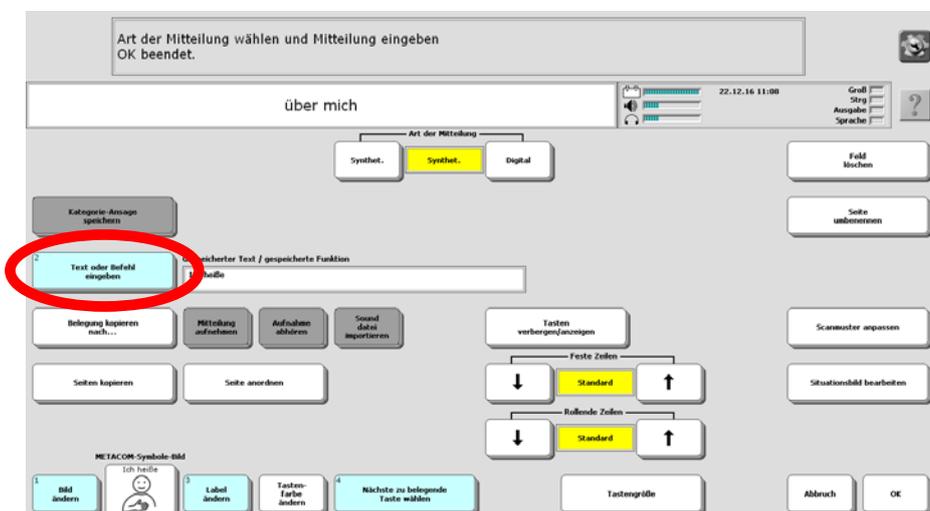

Drücken Sie <Text oder Befehl eingeben>.

Mit Hilfe der Buchstabentastatur, die dann erscheint, können Sie Ihren Namen ergänzen.

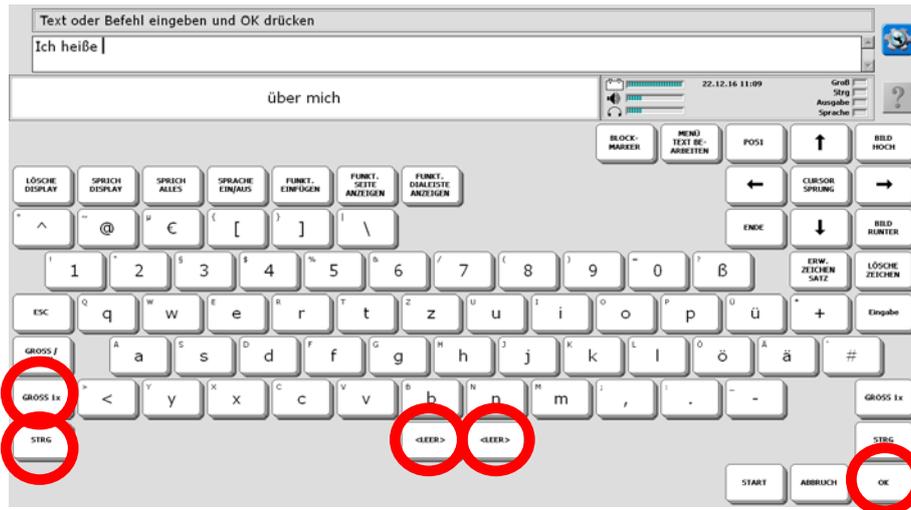


Mit den beiden Tasten unten links können Sie die Groß- und Kleinschreibung verändern.


Nach Ihrem Namen machen Sie bitte ein Leerzeichen (unten Mitte).

Beenden Sie die Eingabe mit <OK> (unten rechts).

Die Anzeige im Display springt zurück und Sie sehen den ergänzten Text:

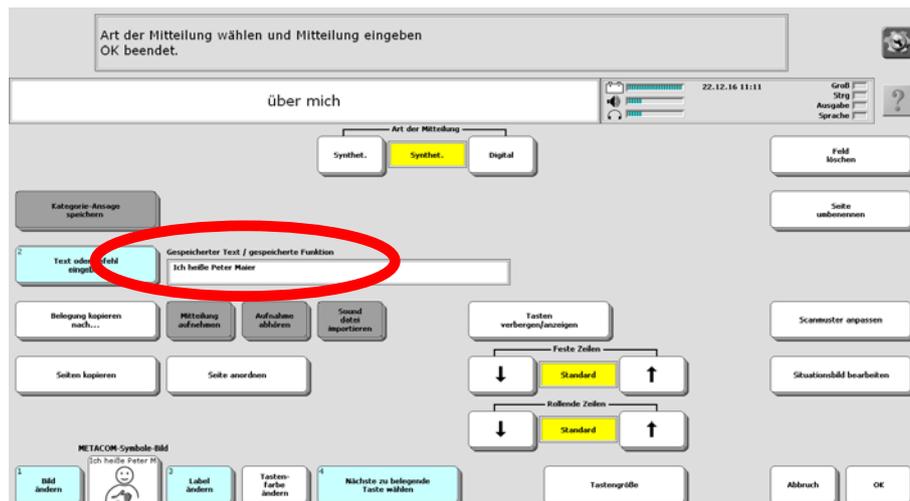


Um auch die Angaben auf den Tasten <Ich wohne in>, <Alter>, <Telefonnummer> und <e-mail Adresse> zu ergänzen, drücken Sie das Feld <nächste zu belegende Taste wählen> und verfahren Sie wie im vorangegangenen Beispiel.

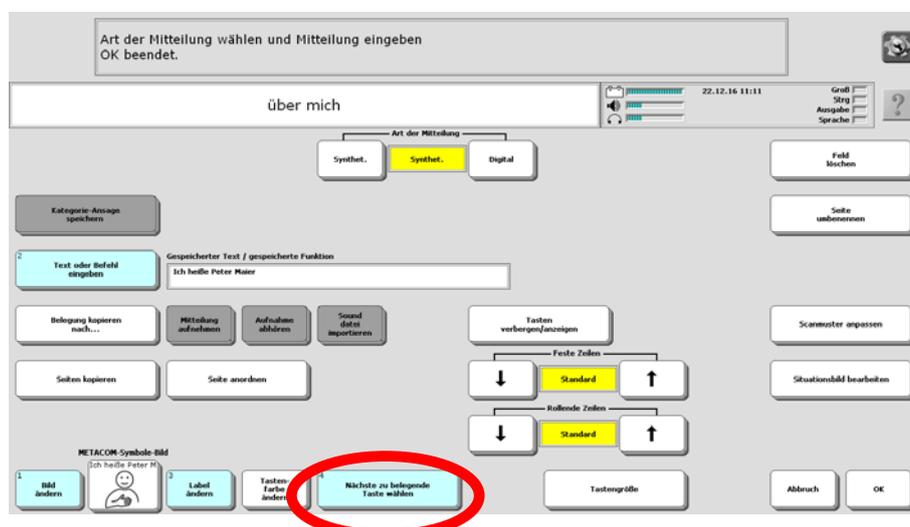


Felder, auf denen noch nichts gespeichert ist, können Sie selbst belegen, indem Sie einen eigenen Text eingeben.

Wenn der Text zu lang ist, um auf der Taste angezeigt zu werden, wählen Sie die Funktion <Label ändern> und geben dort nur ein Stichwort als Merkhilfe ein. Wenn Sie auf der Taste ein Bild hinzufügen möchten, gelangen Sie mit der Funktion <Bild ändern> in das Bildarchiv des Talkers. Standardmäßig enthält der Talker im Modus „ABC-Programme“ keine Bilder. Um Bilder zu verwenden:

1. Erwerben Sie einen der optional erhältlichen Symbolsätze METACOM oder PCS.
2. Importieren Sie eigene Bilder in den Talker (siehe Handbuch).

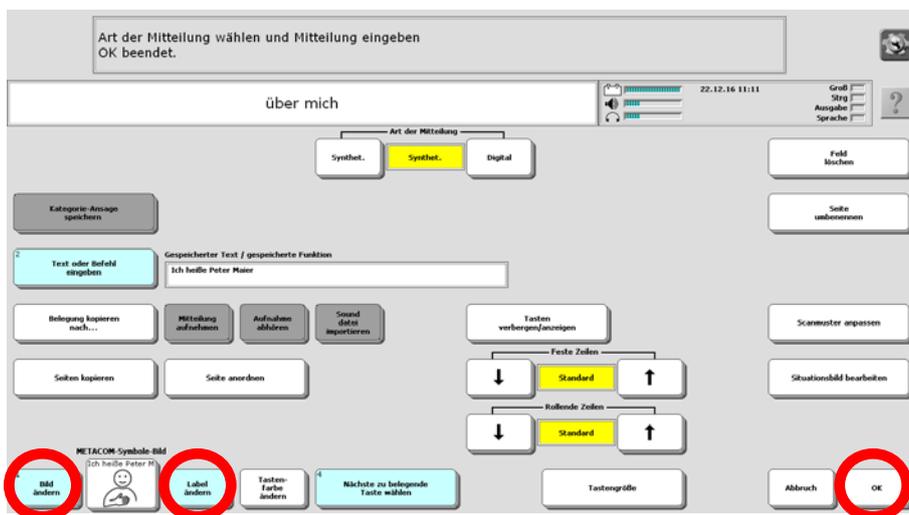

Nachdem Sie Ihre persönlichen Änderungen eingefügt haben, beenden Sie das Menü mit <OK> (unten rechts). Es erscheint wieder die Toolbox.

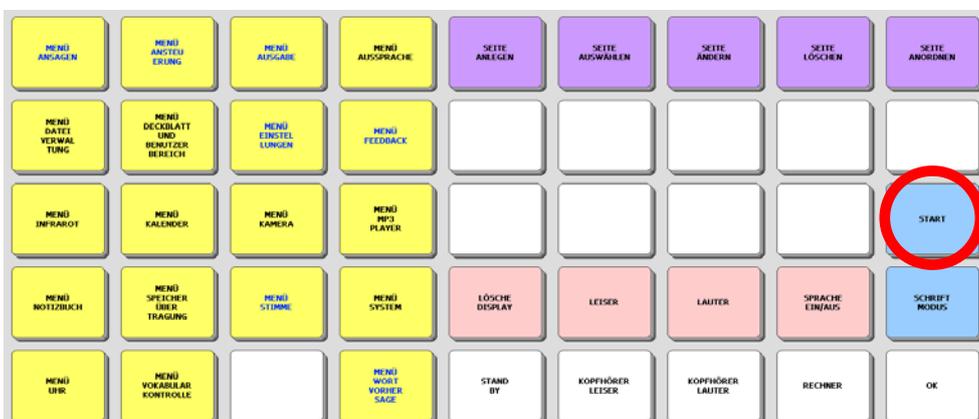

Die hellblaue Taste <START> bringt Sie zurück zum Ausgangsseite SCHRIFT des Programms „ABC 60“.

Ausführliche Informationen zum Thema „Seiten“ entnehmen Sie bitte dem Heft „Das kleine Handbuch“, das Sie mit dem Talker erhalten haben, oder der Bedienungsanleitung im Kapitel „Das persönliche Deckblatt / Seiten“.

## Seiten ändern über die SETUP-Taste

Die Setup-Taste ermöglicht ein schnelles und intuitives Bearbeiten von Tasten ohne den „Umweg“ über die Toolbox.

1. Öffnen Sie die Seite, auf der Sie eine Aussage speichern oder bearbeiten wollen




2. Tippen Sie auf die Taste . Das Menü TOOLS wird angezeigt:

3. Tippen Sie auf die Taste .
4. Wählen Sie die zu bearbeitende Taste aus:



5. Geben Sie die Aussage ein. Wenn gewünscht, wählen Sie ein passendes Symbol.

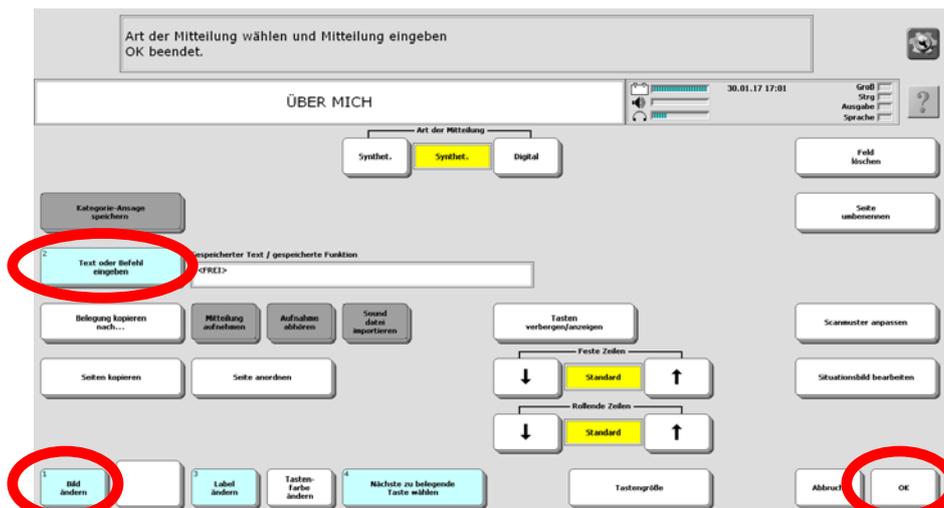

6. Drücken Sie zum Abschluss auf „OK“:

## Speichern von spontan erstellten Aussagen mit der Taste „Speichern“

Alle Themenseiten enthalten links oben eine Taste „Speichern“ , mit der Sie den aktuell im Textfenster befindlichen Text auf einer Taste der aktuellen Seite speichern können.


Haben Sie z. B. eine Aussage formuliert, die Sie gerne aufheben möchten, weil Sie sie öfter verwenden wollen, können Sie sie mit Hilfe der Taste „Speichern“ bequem auf einer Seite Ihrer Wahl dauerhaft speichern.

Bis auf die Seiten „Meine Sätze 1“ und „Meine Sätze 2“ ist die Taste „Speichern“ zunächst ausgeblendet.

### Taste „Speichern“ sichtbar machen über die Toolbox

Öffnen Sie die Toolbox.


Drücken Sie die Taste SEITE ÄNDERN

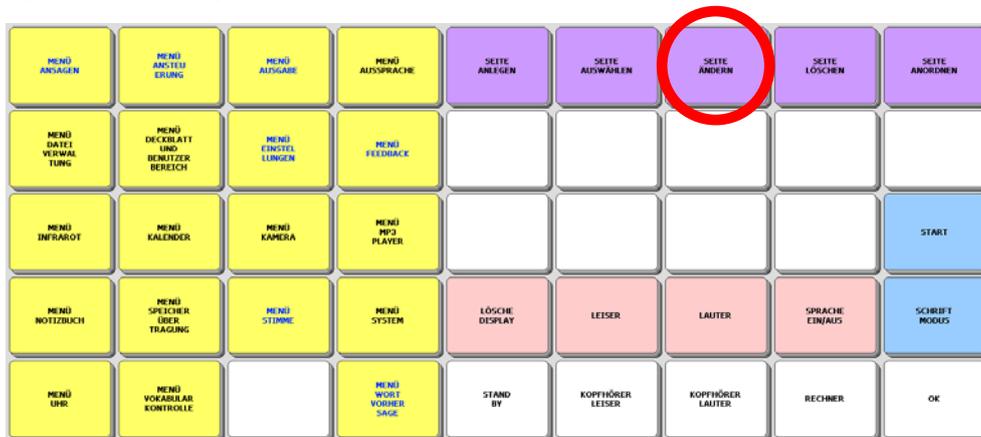


Wählen Sie die zu Seite aus, auf der Sie die Taste „Speichern“ sichtbar machen wollen, z. B. ÜBER MICH.




Im Display erscheint die Seite ÜBER MICH. Oben links im Textfenster steht die Aufforderung: „Taste auswählen“. Tippen Sie auf die Taste „Speichern“.

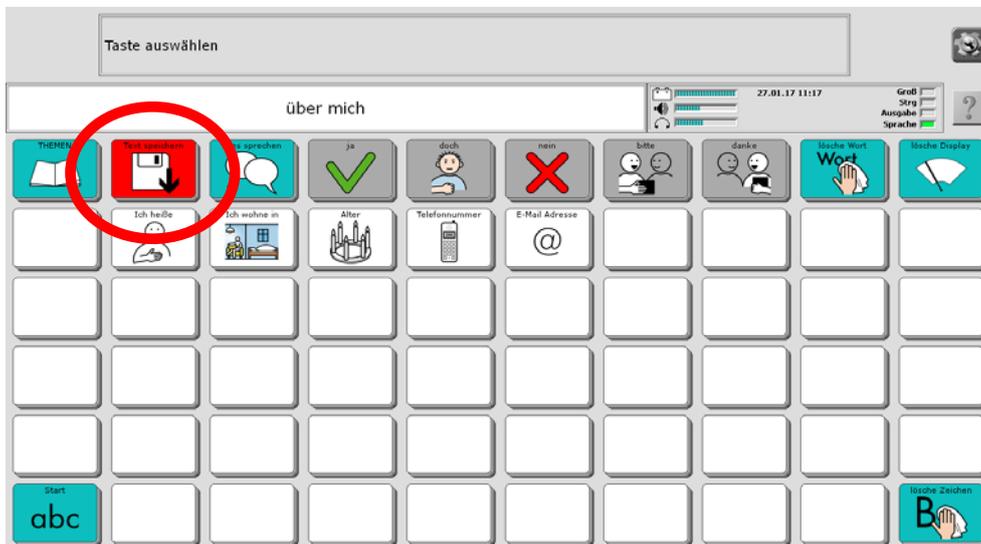


Wählen Sie die Option „Tasten verbergen/anzeigen“.

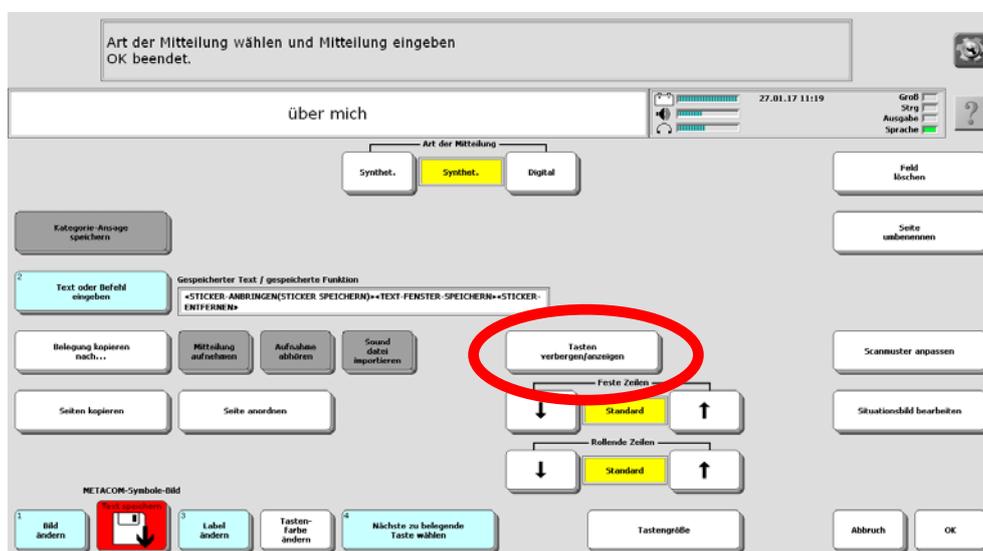

Die Seite wird angezeigt. Ausgeblendete Felder werden ausgegraut angezeigt.

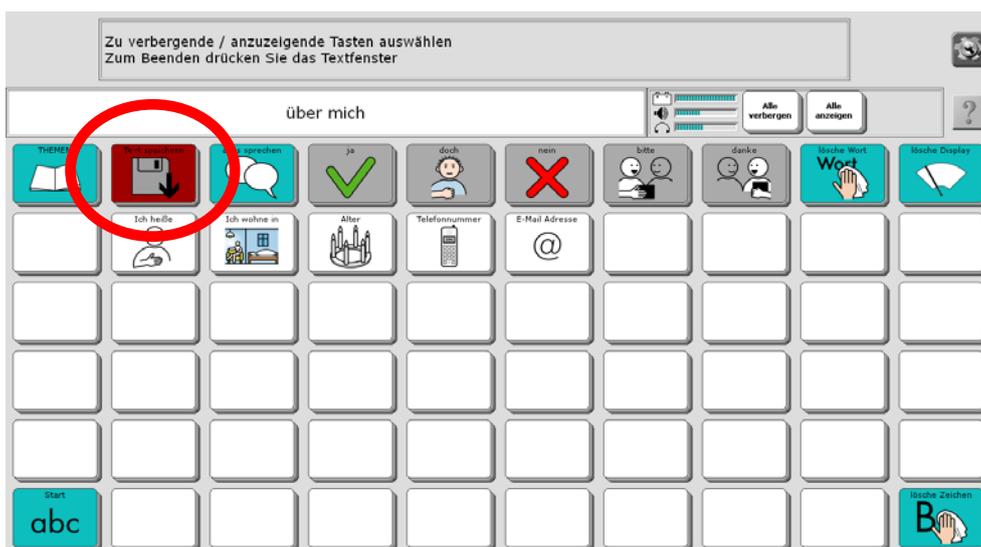


Tippen Sie auf die Taste „Speichern“ . Die Taste wird wieder „normal“ angezeigt.

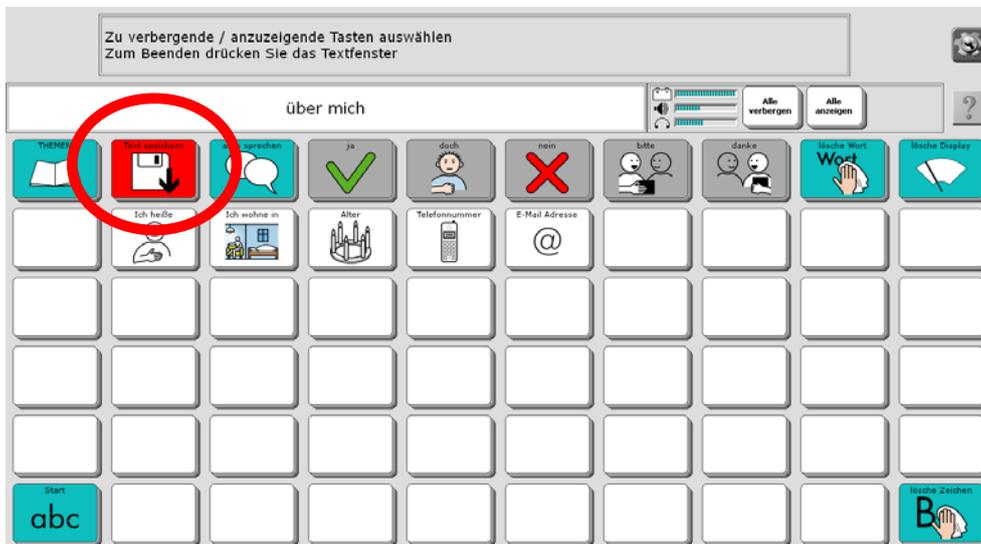


Tippen Sie oben in den grauen Bereich des Textfensters, um den Modus „Tasten verbergen / anzeigen“ zu beenden.



Tippen Sie auf „OK“, um das Bearbeiten der Seite zu beenden.

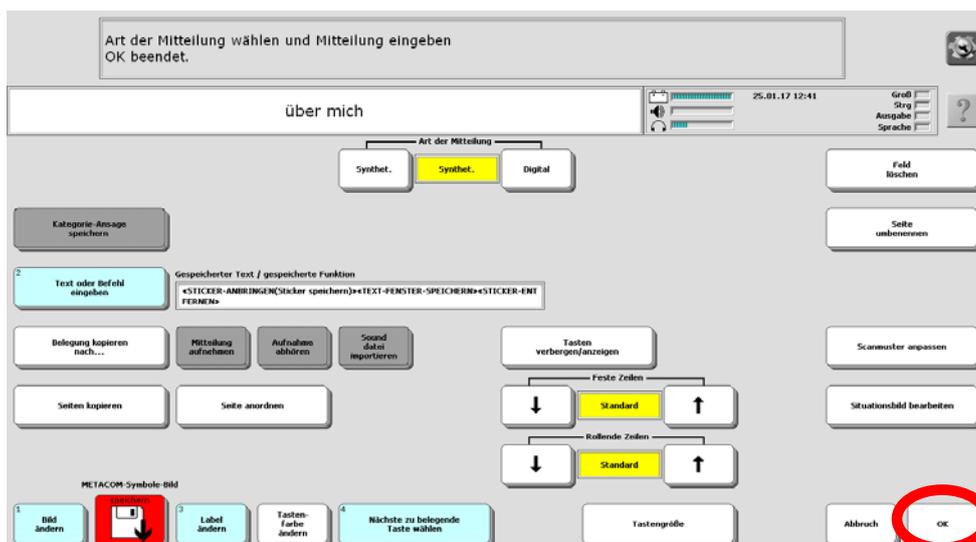

Schließen Sie die Toolbox durch Tippen auf „OK“.  
Die Taste „Speichern“ ist nun auf der Seite ÜBER MICH sichtbar:

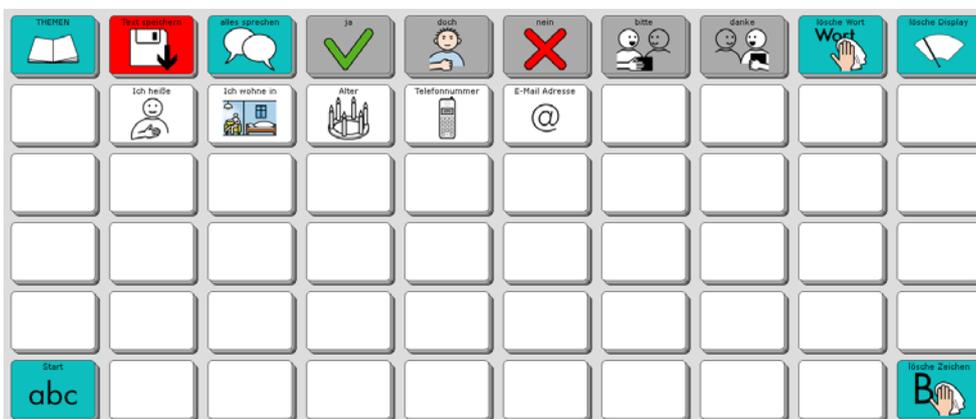


Verfahren Sie entsprechend mit allen Seiten, auf denen Sie die Taste „Speichern“ nutzen wollen.

## Taste „Speichern“ sichtbar machen über das Menü TOOLS

Die Taste „anzeigen/verbergen“ im Menü TOOLS ermöglicht ein schnelles und intuitives Sichtbarmachen von Tasten ohne den „Umweg“ über die Toolbox.


Öffnen Sie die Seite, auf der Sie eine Taste sichtbar machen oder verbergen wollen

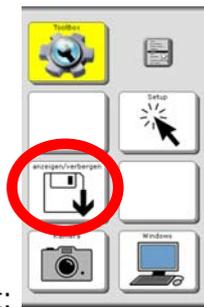


Tippen Sie auf die Taste . Das Menü TOOLS wird angezeigt:

Tippen Sie auf die Taste .

Im Display erscheint wieder die aktuelle Seite. Ausgeblendete Felder werden ausgegraut angezeigt.

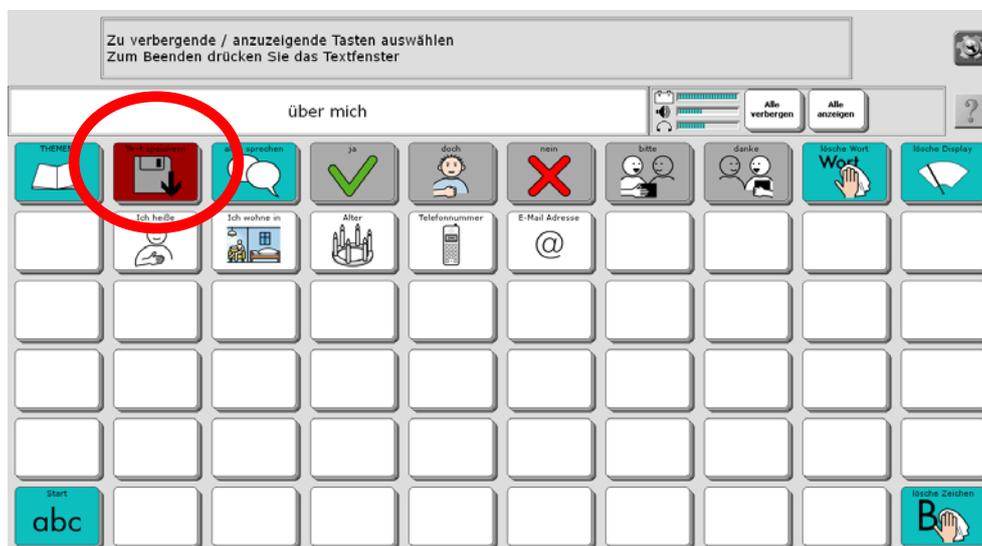


Tippen Sie auf die Taste „Speichern“ . Die Taste wird wieder „normal“ angezeigt.

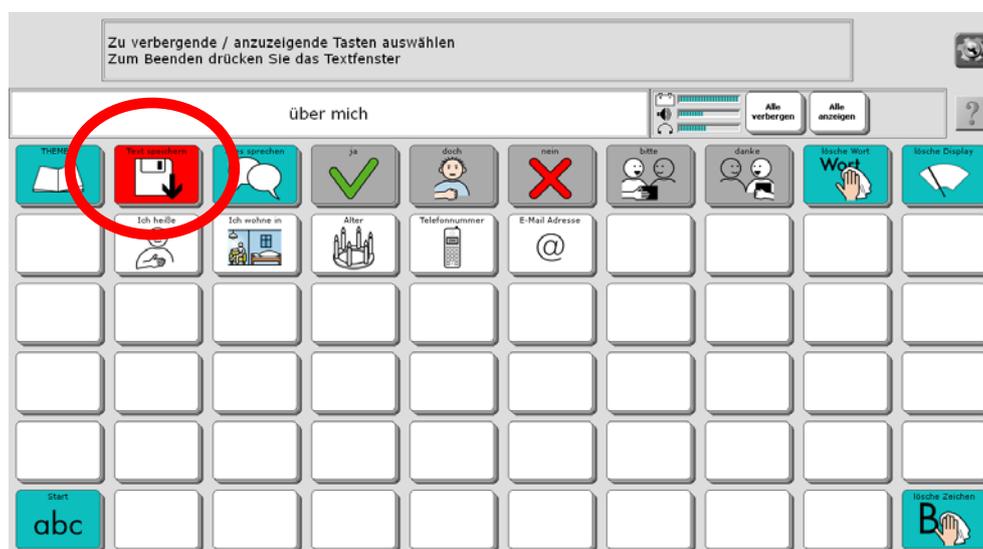


Tippen Sie oben in den grauen Bereich des Textfensters, um den Modus „Tasten verbergen / anzeigen“ zu beenden.

## Taste „Speichern“ benutzen


Formulieren Sie eine Aussage. Öffnen Sie anschließend über die Seite THEMEN die Themenseite, auf der Sie die Aussage dauerhaft speichern möchten (z. B. die Seite ÜBER MICH). Tippen Sie auf die Taste „Speichern“.

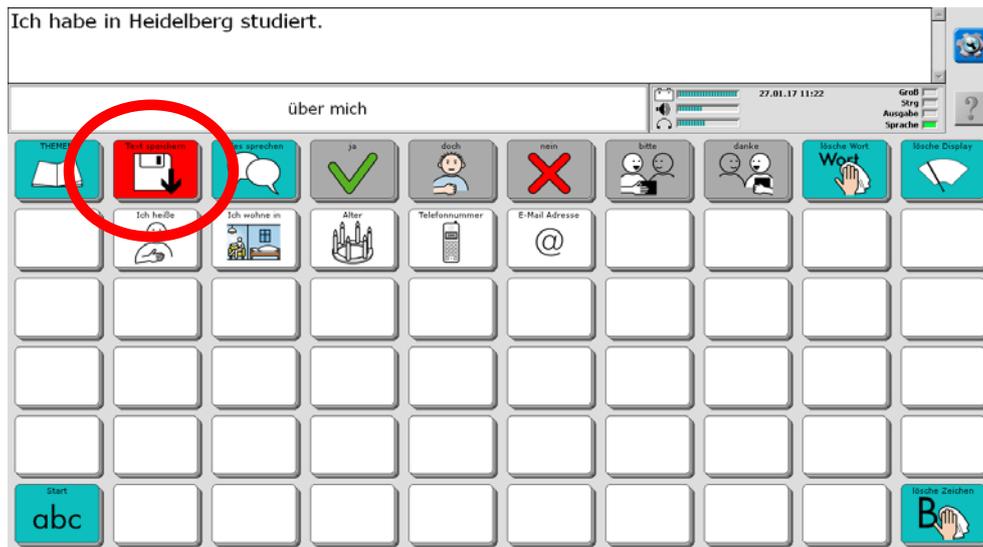

Wählen Sie die Taste aus, auf der die Aussage gespeichert werden soll. Wenn Sie eine bereits belegte Taste auswählen, wird der Inhalt der Taste überschrieben!

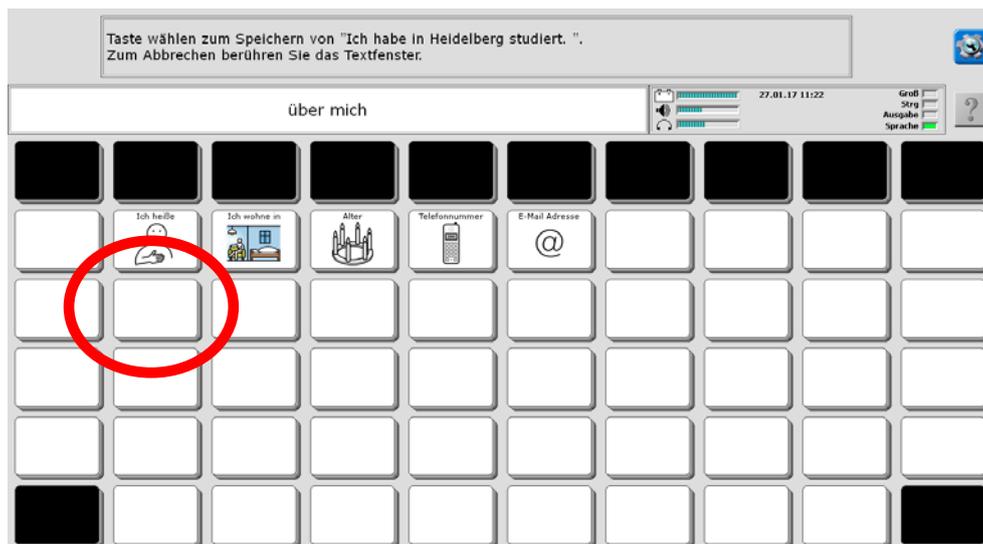


Die Aussage ist auf der Taste gespeichert.

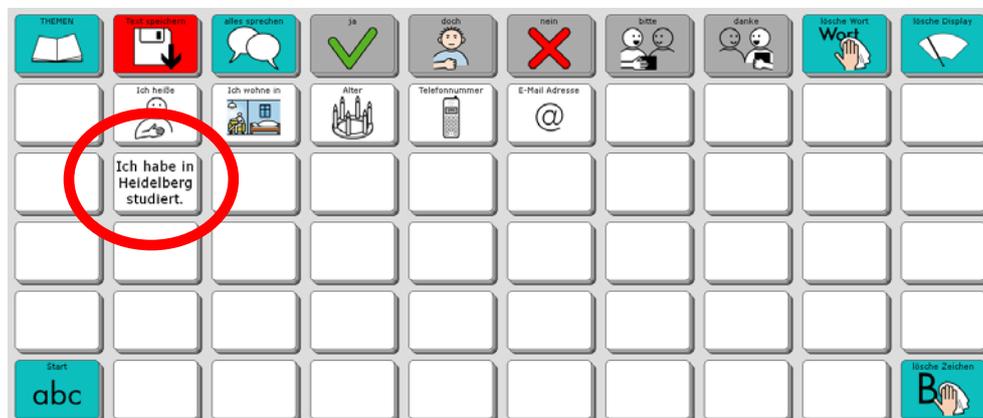

## Aussprache korrigieren

Besonders bei Namen von Personen und Orten kann es vorkommen, dass der Talker den Namen mit der synthetischen Stimme nicht so ausspricht, wie Sie es gerne hätten. In diesem Fall sollten Sie das betreffende Wort zum Aussprache-Lexikon hinzufügen, damit der Talker lernt, den Begriff richtig auszusprechen.

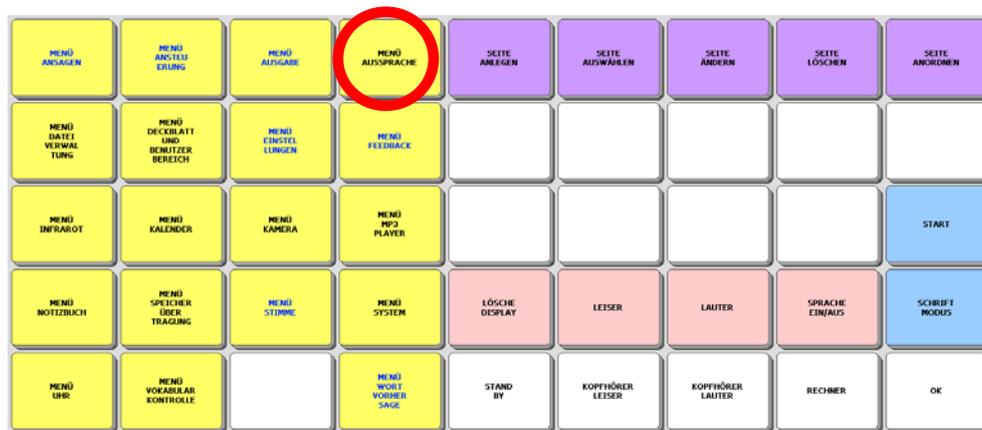

Wie Sie neue Wörter in das Aussprache-Lexikon einfügen können, entnehmen Sie bitte dem Heft „Das kleine Handbuch“, das Sie mit dem Talker erhalten haben.

## Besondere Funktionen des Talkers

Auf den Themenseiten INFRAROT, MEINE LIEDER, HANDY, TABLET, MAUS, PC FUNKTIONEN, NOTIZBUCH und FUNKTIONEN haben Sie Zugang zu besonderen Talkerfunktionen, die im Folgenden vorgestellt werden.


### Infrarot-Signale

Der Talker verfügt über eine eingebaute lernfähige Infrarot-Umfeldkontrolle. Das bedeutet, dass Sie mit dem Talker Ihre IR-fernbedienbaren Geräte steuern können, wenn Sie Ihr Gerät aus einer Liste geladen oder dem Talker die entsprechenden IR-Befehle beigebracht haben.

Bitte lesen Sie dazu die entsprechenden Abschnitte im Kapitel „Umfeldkontrolle“ in der Bedienungsanleitung.


Im Programm „ABC 60“ haben wir bereits Seiten angelegt, auf denen Sie die IR-Befehle für TV, Video, CD und Radio speichern können. Die Seiten zu den verschiedenen Geräten öffnen Sie von der INFRAROT-SEITE ausgehend.

### Die Seite INFRAROT

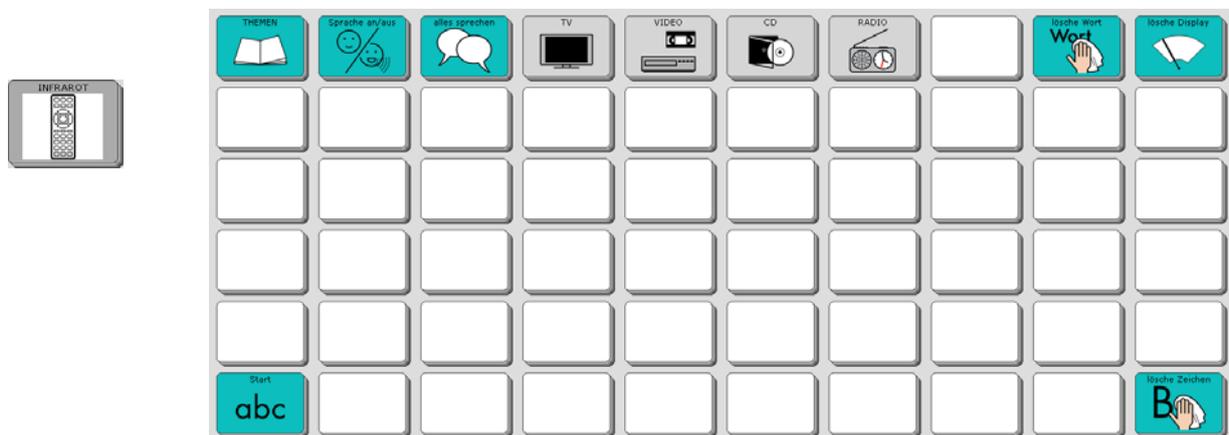


Diese Seite ermöglicht das Steuern von per Infrarot fernbedienbaren Haushaltsgeräten. Wählen Sie das Gerät, um die Seite mit den Befehlen angezeigt zu bekommen.

### Die Seite INFRAROT - TV

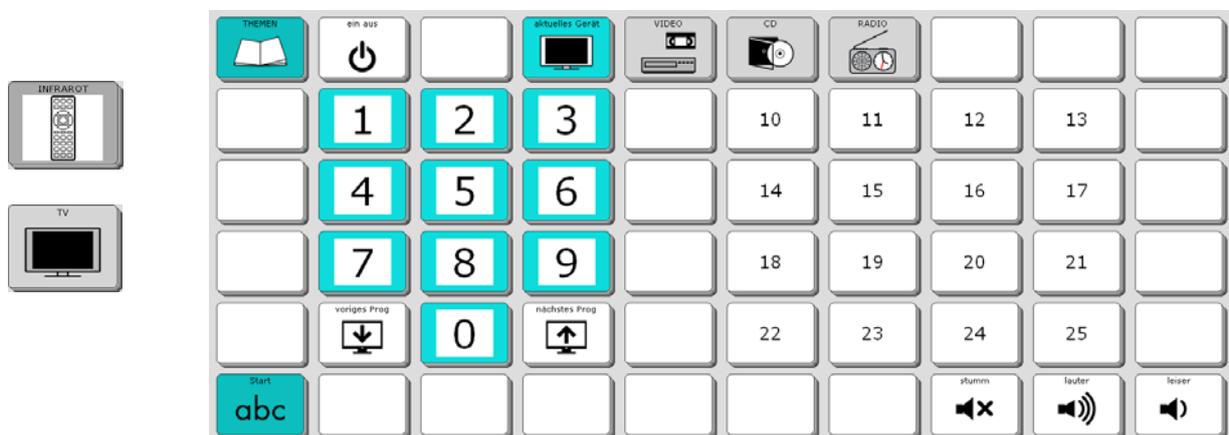


Diese Seite ermöglicht das Steuern eines per Infrarot fernbedienbaren Fernsehers.

## Die Seite INFRAROT - VIDEO

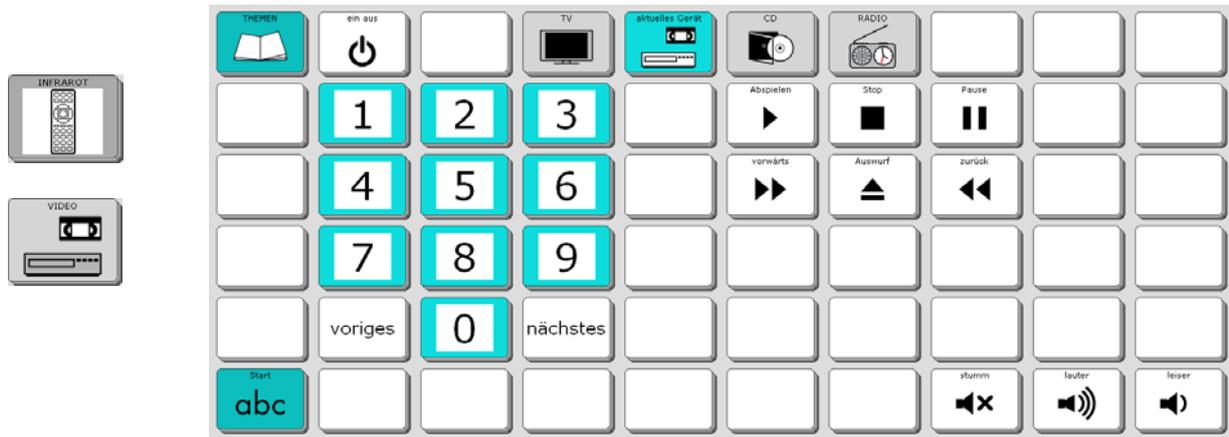


Diese Seite ermöglicht das Steuern eines per Infrarot fernbedienbaren Videorekorders.

## Die Seite INFRAROT - CD

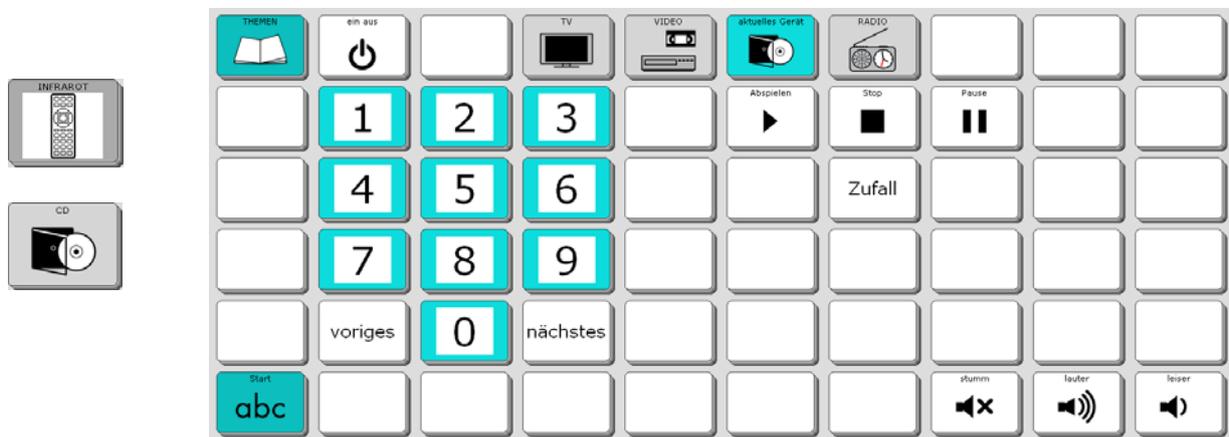

Diese Seite ermöglicht das Steuern eines per Infrarot fernbedienbaren CD-Players.


## Die Seite INFRAROT - RADIO

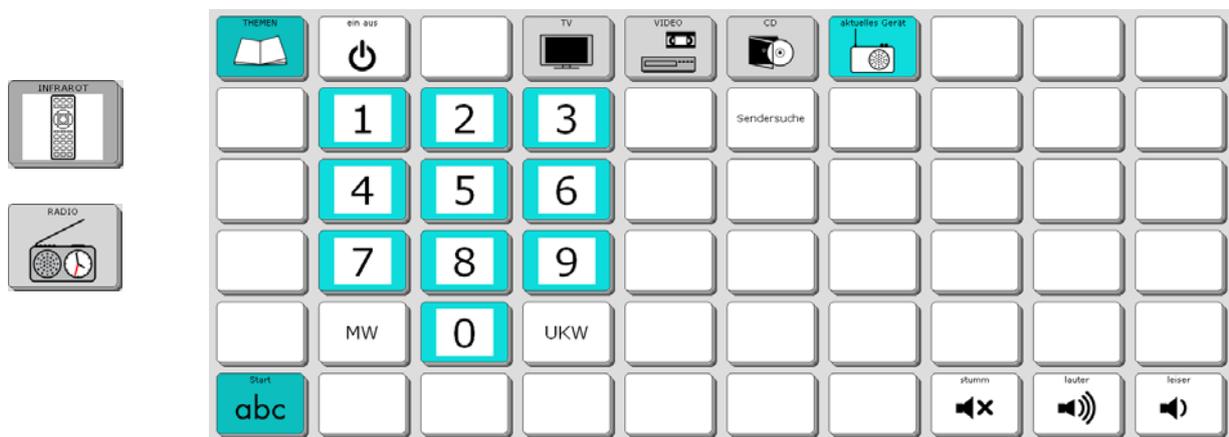

Diese Seite ermöglicht das Steuern eines per Infrarot fernbedienbaren Radios.

## Die Seite MEINE LIEDER

Der Talker kann Audio-Dateien im Format MP3, WMA und WAV wiedergeben. Sie können einzelne Dateien entweder direkt auf der Seite MEINE LIEDER speichern oder sie mit Hilfe des Menüs MP3-PLAYER von einem USB-Stick oder einer SD-Karte lesen lassen.

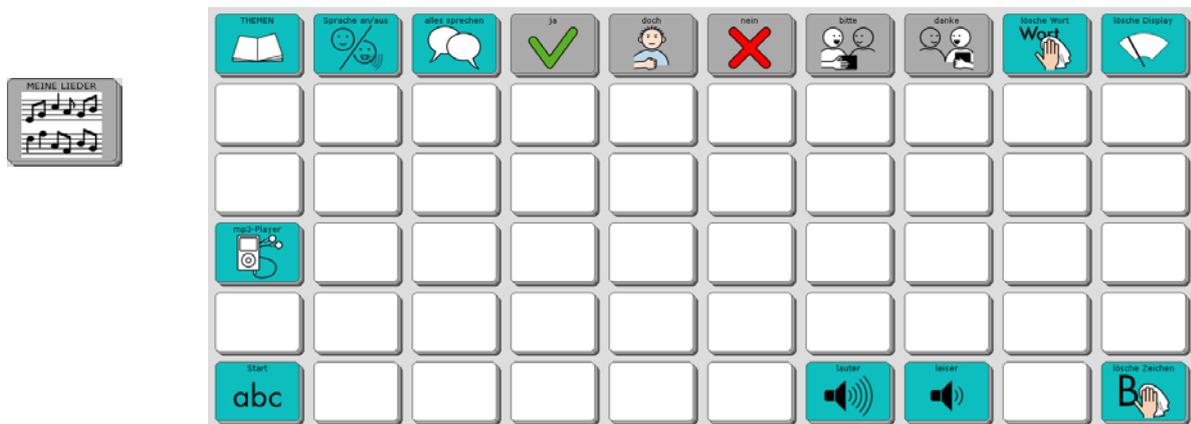


Um eine Musik-Datei direkt auf der Seite MEINE LIEDER zu speichern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. USB-Stick anschließen oder SD-Karte mit der oder den zu speichernden Datei(en) einlegen
2. Toolbox öffnen
3. SEITE ÄNDERN: Seite „MEINE LIEDER“ auswählen
4. Taste auswählen, auf der die Datei gespeichert werden soll
5. NAME ÄNDERN: z.B. Titel eingeben
6. ART DER MITTEILUNG: digital
7. SOUNDDATEI IMPORTIEREN: Datei auswählen
8. OK
9. START

Da Musik-Dateien viel Speicherplatz benötigen, empfehlen wir Ihnen, nur eine begrenzte Zahl von Liedern direkt auf der Seite MEINE LIEDER zu speichern und ansonsten das Menü MP3-PLAYER zur Wiedergabe von Sounddateien zu benutzen, die von einem externen Datenträger (USB-Stick, SD-Karte) wiedergegeben werden. Die Wiedergabe steuern Sie mit Hilfe des Menüs MP3-Wiedergabe, das Sie über die Taste




erreichen.

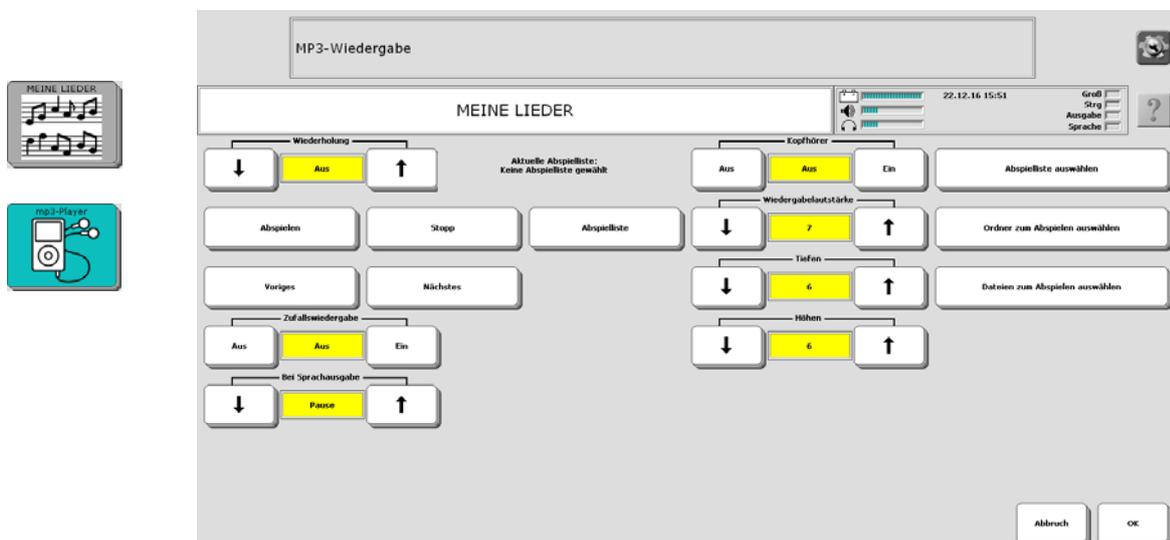

Lesen Sie dazu bitte das Kapitel „MP3-Player“ in der Bedienungsanleitung.


## Die Seite HANDY

Diese Seite ermöglicht das Steuern eines mittels Bluetooth gekoppelten Mobiltelefons oder Smartphones.

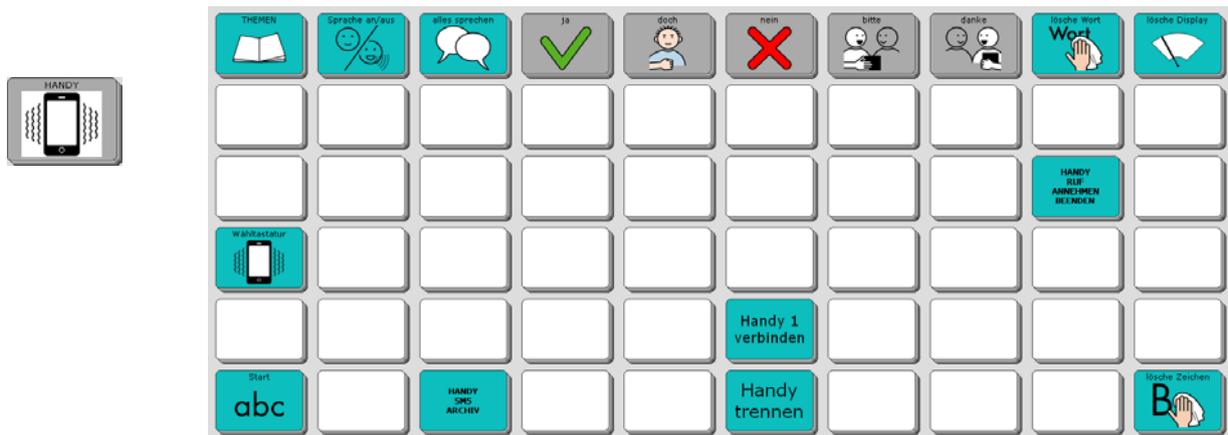

### Wähltastatur

Die Taste  öffnet das Menü „Wähltastatur“.

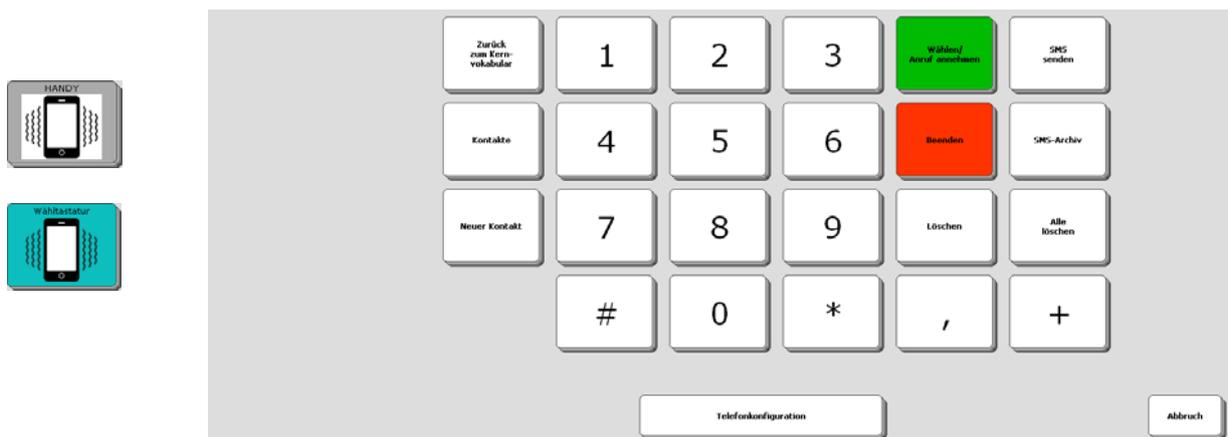

### Handy Ruf annehmen / beenden

Die Taste  dient zum Annehmen eines eingehenden Anrufs. Mit derselben Taste kann ein laufender Anruf auch wieder beendet werden.

### Handy SMS-Archiv

Bei geeigneten Mobiltelefonen und Smartphones hat der Accent Zugriff auf das SMS-Archiv. Mit der Taste  können Sie das Archiv öffnen und eingegangene SMS lesen.

Ausführliche Informationen zum Thema Handysteuering mit dem Talker finden Sie in der Bedienungsanleitung im Kapitel „Handysteuering“. Dort finden Sie auch Hinweise auf die jeweiligen Einstellungen für Bluetooth- oder USB-Verbindungen.

## Handy 1 verbinden



Die Taste  dient zum Verbinden des als erstes Telefon gekoppelten Mobiltelefons oder Smartphones.


## Handy trennen




Die Taste  dient zum Trennen des aktuellen verbundenen Mobiltelefons oder Smartphones. Die Bluetooth-Schnittstelle des Talkers kann danach für andere Aufgaben verwendet werden.

## Die Seite TABLET

Diese Seite ermöglicht das Steuern eines per Kabel oder Bluetooth gekoppelten Tabletcomputers.

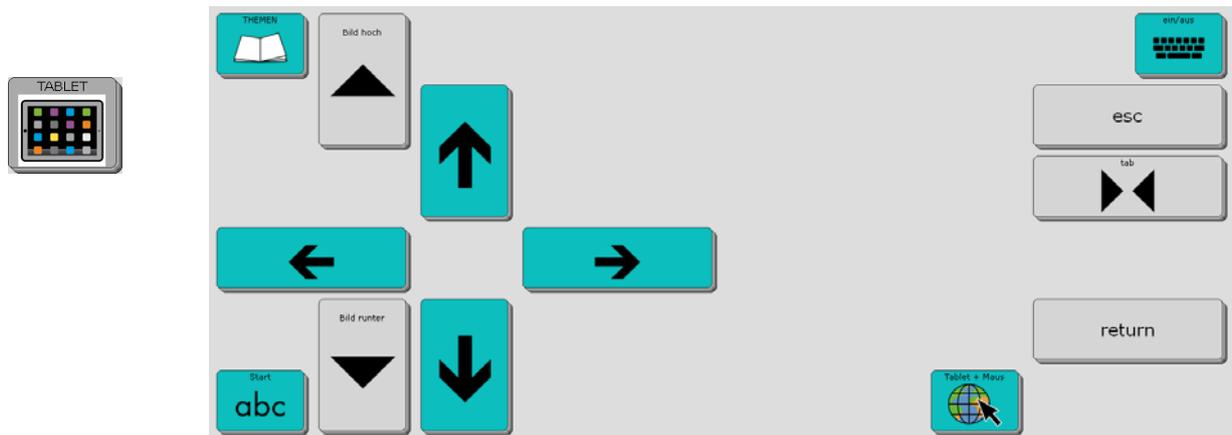

### Bild hoch / Bild runter

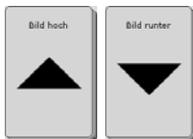

Die Tasten   entsprechen den Tasten „Bild hoch“ und „Bild runter“ der PC-Tastatur.

### Links / rechts / hoch / runter



Die Tasten     entsprechen den Pfeiltasten der PC-Tastatur.

### Ein / aus



Die Taste  schaltet die Ausgabe aus bzw. wieder ein.

### Esc



Die Taste  entspricht der Taste „Esc“ der PC-Tastatur.

### Tab



Die Taste  entspricht der Taste „Tab“ der PC-Tastatur.

### Return




Die Taste  entspricht der Eingabetaste der PC-Tastatur.


### Maus




Die Taste  öffnet die Seite zum Steuern des Mauszeigers (siehe Seite 114).

## Die Seite MAUS

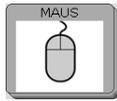

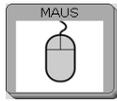Die Taste  öffnet die Seite mit Tasten zum Steuern des Mauszeigers.

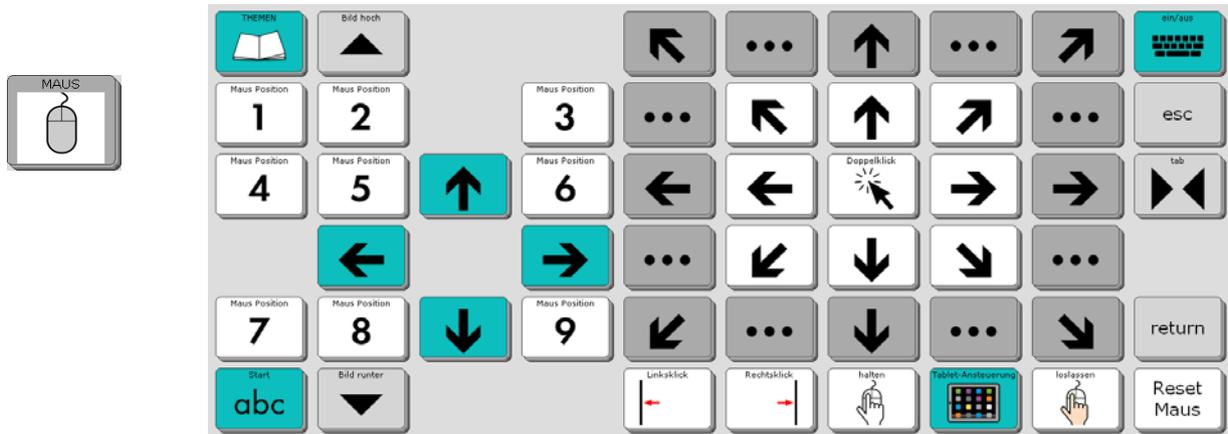


## Tablet



Die Taste  öffnet die Seite zum Steuern eines Tabletcomputers (siehe Seite 113).

## Mausposition 1...9

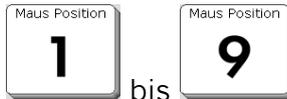

Diese Tasten  bis  positionieren den Mauszeiger an absoluten Positionen oben links, oben Mitte, oben rechts, links Mitte, Mitte Mitte, rechts Mitte, unten links, unten Mitte bzw. unten rechts.

## Bild hoch / Bild runter



Die Tasten   entsprechen den Tasten „Bild hoch“ und „Bild runter“ der PC-Tastatur.

## Links / rechts / hoch / runter



Die Tasten     entsprechen den Pfeiltasten der PC-Tastatur.

## Pfeiltasten




Die Pfeiltasten    bewegen des Mauszeiger relativ zur aktuellen Position in Pfeilrichtung. Die Pfeile auf weißem Hintergrund stehen für kleine Schritte, die auf grauem Hintergrund für größere Schritte.


## Doppelklick




Die Taste  führt einen Doppelklick der linken Maustaste an der aktuellen Mauszeigerposition aus.


## Linksklick

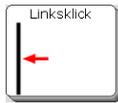

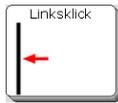Die Taste  führt einen einfachen Klick der linken Maustaste an der aktuellen Mauszeigerposition aus.

## Rechtsklick

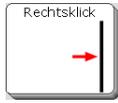

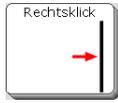Die Taste  führt einen einfachen Klick der rechten Maustaste an der aktuellen Mauszeigerposition aus.

## Halten



Die Taste  hält die linke Maustaste an der aktuellen Mauszeigerposition gedrückt.

## Loslassen



Die Taste  löst die linke Maustaste an der aktuellen Mauszeigerposition.

## Reset Maus



Die Taste  löst alle evtl. gehaltenen Maustasten.

## ein/aus



Die Taste  schaltet die Ausgabe aus bzw. wieder ein.

## Esc



Die Taste  entspricht der Taste „Esc“ der PC-Tastatur.

## Tab



Die Taste  entspricht der Taste „Tab“ der PC-Tastatur.

## Return




Die Taste  entspricht der Eingabetaste der PC-Tastatur.

## Die Seite PC FUNKTIONEN



Die Taste  öffnet die Seite mit Tasten zum Steuern eines per Kabel oder Bluetooth verbundenen PCs.

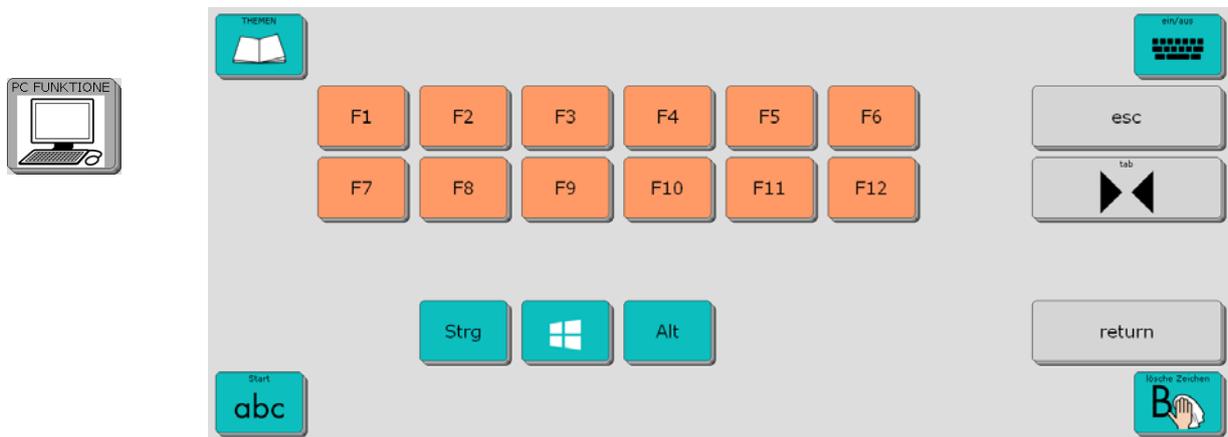

### Bild hoch / Bild runter

Die Tasten  bis  entsprechen den Funktionstasten der PC-Tastatur.

### Strg

Die Taste  entspricht der Taste „Strg“ der PC-Tastatur.

### Windows

Die Taste  entspricht der Windows-Taste der PC-Tastatur.

### Alt

Die Taste  entspricht der Taste „Alt“ der PC-Tastatur.

### Ein / aus

Die Taste  schaltet die Ausgabe aus bzw. wieder ein.

### Esc

Die Taste  entspricht der Taste „Esc“ der PC-Tastatur.


### Tab

Die Taste  entspricht der Taste „Tab“ der PC-Tastatur.

### Return


Die Taste  entspricht der Eingabetaste der PC-Tastatur.

## Die Seite NOTIZBUCH

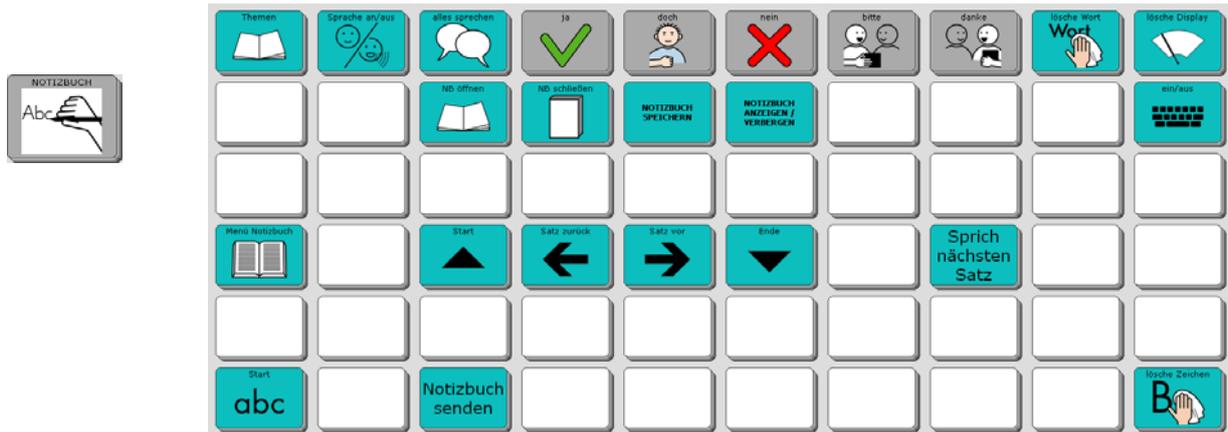

Wenn Sie längere Texte verwalten möchten, können Sie dafür die NOTIZBUCH-Funktionen des Talkers benutzen. Ein geöffnetes Notizbuch erkennen Sie am gelb hinterlegten Textfenster. Alles, was Sie in ein Notizbuch schreiben, bleibt erhalten.

## Menü Notizbuch

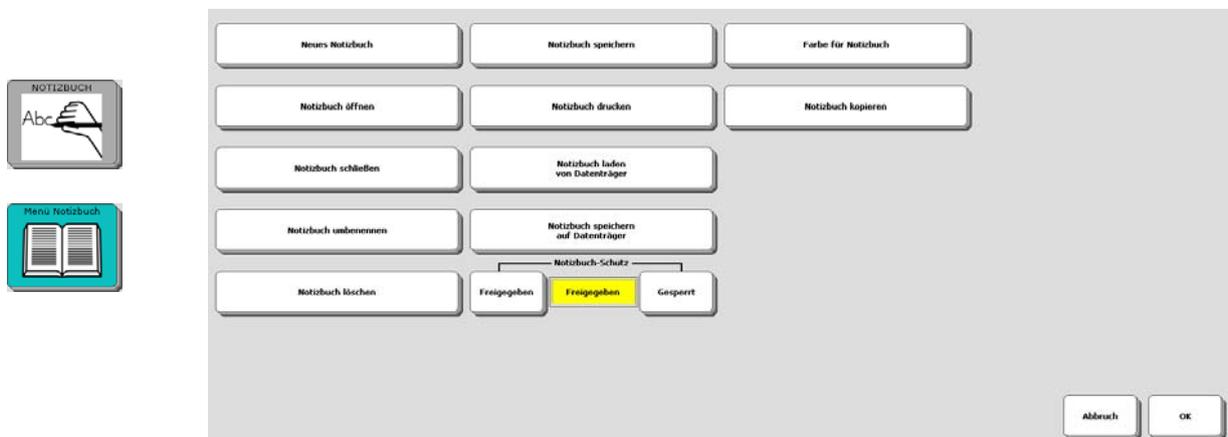


Die Taste „Menü Notizbuch“ öffnet das Talker-Menü NOTIZBUCH mit allen Optionen.


## Notizbuch öffnen



Die Taste „Menü Notizbuch“ öffnet die Übersicht aller angelegter Notizbücher. Tippen Sie auf ein Notizbuch, um es zu öffnen.

## Notizbuch schließen

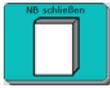

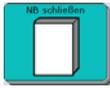Die Taste  schließt das aktuell geöffnete Notizbuch wieder. Alle Ihre Änderungen werden automatisch gesichert.

## Notizbuch speichern



Die Taste  dient zum Speichern des aktuellen Notizbuches, ohne es zu schließen.

## Notizbuch anzeigen/verbergen



Die Taste  dient zum Verbergen des aktuellen Notizbuches. Es bleibt im Hintergrund geöffnet. Wählen Sie erneut „Notizbuch anzeigen/verbergen“, um ein im Hintergrund geöffnetes Notizbuch wieder in den Vordergrund zu bringen.

## Start



Die Taste  positioniert den Cursor an den Anfang des Notizbuches.

## Satz zurück



Die Taste  positioniert den Cursor an den Anfang des Satzes / des vorigen Satzes.

## Satz vor



Die Taste  positioniert den Cursor an das Ende des Satzes / den Anfang des nächsten Satzes.

## Ende



Die Taste  positioniert den Cursor an das Ende des Notizbuches.

## Sprich nächsten Satz



Die Taste  spricht den Satz des Notizbuches, in dem der Cursor gerade steht. Jede erneute Auswahl dieser Taste spricht einen weiteren Satz.

## Notizbuch senden




Die Taste  sendet das Notizbuch an das im Menü AUSGABE eingestellte Gerät (siehe Menü AUSGABE im NuVoice-Handbuch).

## Ein/aus



Die Taste  schaltet die Ausgabe aus bzw. wieder ein (siehe Menü AUSGABE im NuVoice-Handbuch).

## Die Seite FUNKTIONEN

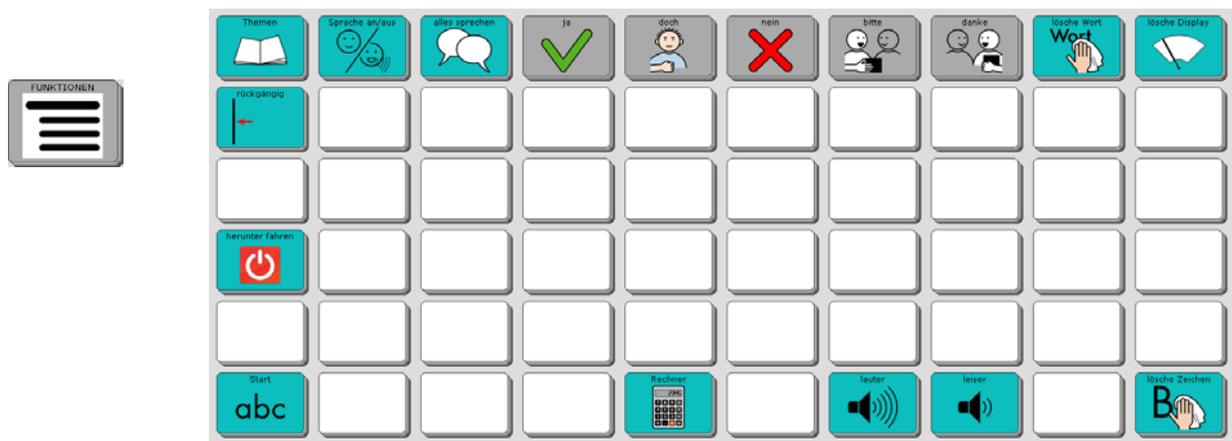

Diese Seite ermöglicht Zugriff auf wichtige Talker-Funktionen und den Taschenrechner.

### Sprache an/aus



Die Taste  schaltet die Sprachausgabe aus bzw. wieder ein. Bei ausgeschalteter Sprachausgabe spricht der Talker nur, wenn Sie auf das Textfenster tippen. Den aktuellen Zustand erkennen Sie in der Statuszeile des Displays.



Sprachausgabe ist eingeschaltet



Sprachausgabe ist ausgeschaltet

### Alles sprechen



Tippen Sie auf die Taste , um den gesamten Inhalt des Textfensters sprechen zu lassen.

### Rückgängig



Die Taste  macht die letzte Aktion rückgängig. Falls Sie versehentlich etwas gelöscht haben das Sie nicht löschen wollten, können Sie den Löschvorgang mit dieser Taste wieder ungeschehen machen.

Es kann nur der zuletzt getätigte Befehl rückgängig gemacht werden.

### Herunterfahren




Die Taste  beendet NuVoice, fährt das Betriebssystem herunter und schaltet den Accent aus. Sie müssen das Herunterfahren bestätigen. Der Neustart des Accents kann bis zu 2 Minuten dauern.

### Rechner



Die Taste  auf der Seite FUNKTIONEN öffnet einen einfachen Taschenrechner. Das Ergebnis der Berechnung befindet sich in der Zwischenablage und kann mit dem Befehl EINFÜGEN in das Textfenster kopiert werden.

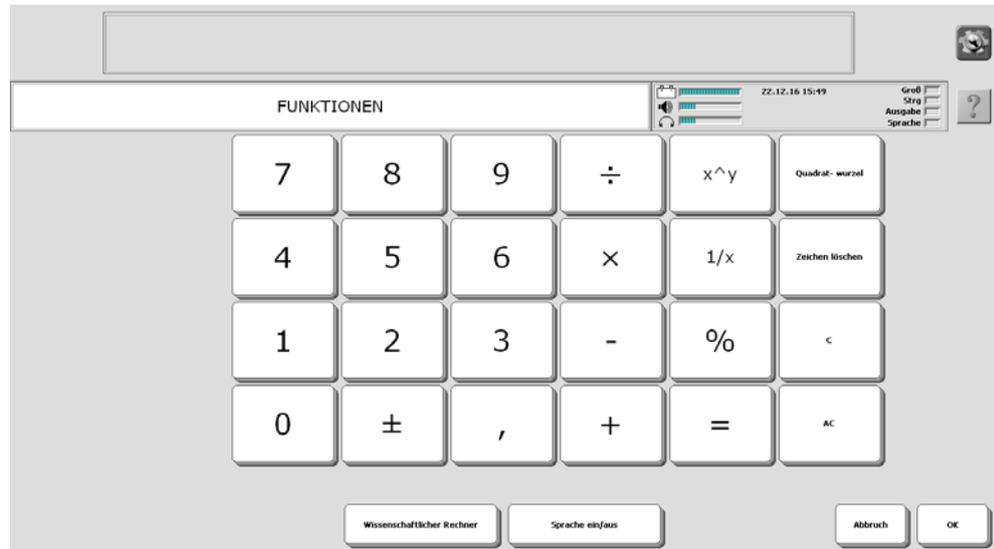

## Lauter



Die Taste  erhöht die Lautstärke der Sprachausgabe um eine Stufe.

## Leiser



Die Taste  reduziert die Lautstärke der Sprachausgabe um eine Stufe.


## Eine letzte Anregung: Speicherübertragung durchführen

Sichern Sie regelmäßig das „ABC 60“ -Programm mit Ihren persönlichen Änderungen, damit Sie im Falle eines Datenverlustes (auch der Talker ist ein Computer!) eine Sicherungskopie Ihres Vokabulars in das Gerät zurück laden können.


### Benutzerbereich sichern

Schließen Sie den mitgelieferten USB-Stick an den Talker an.


Öffnen Sie die Toolbox und wählen Sie das <MENÜ SPEICHERÜBERTRAGUNG>

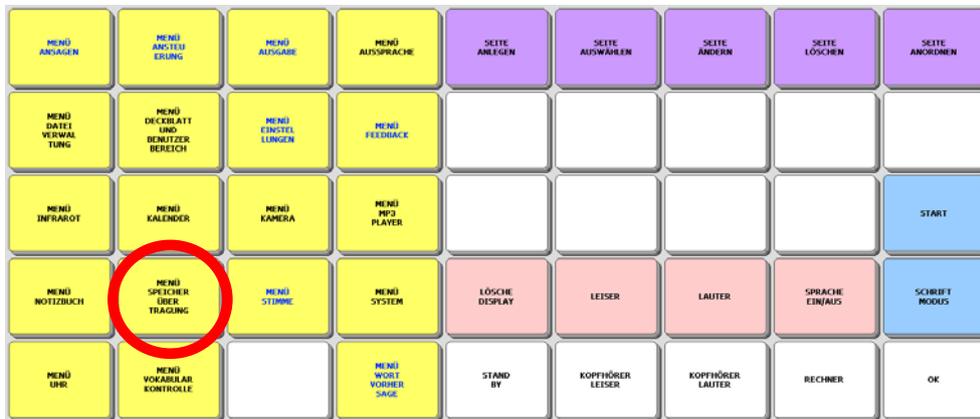


Tippen Sie auf das Feld <Benutzerbereich sichern>

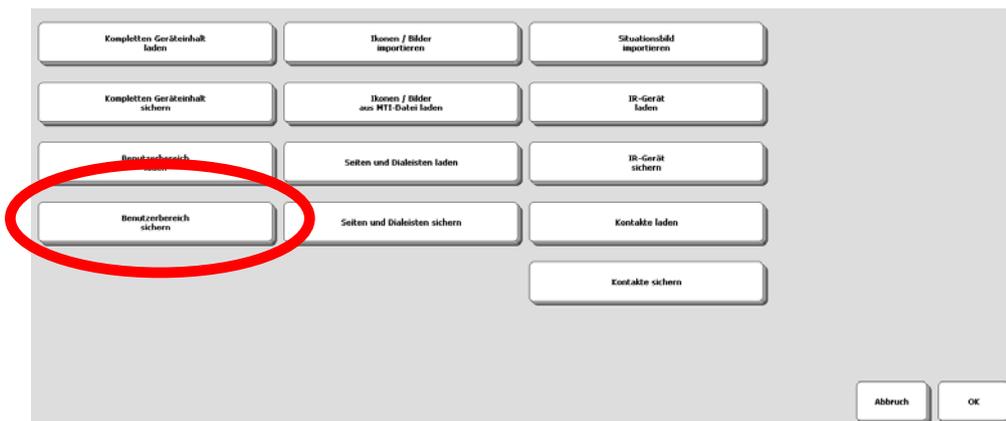

Wählen Sie den aktuellen Bereich als zu sichernden Bereich aus.

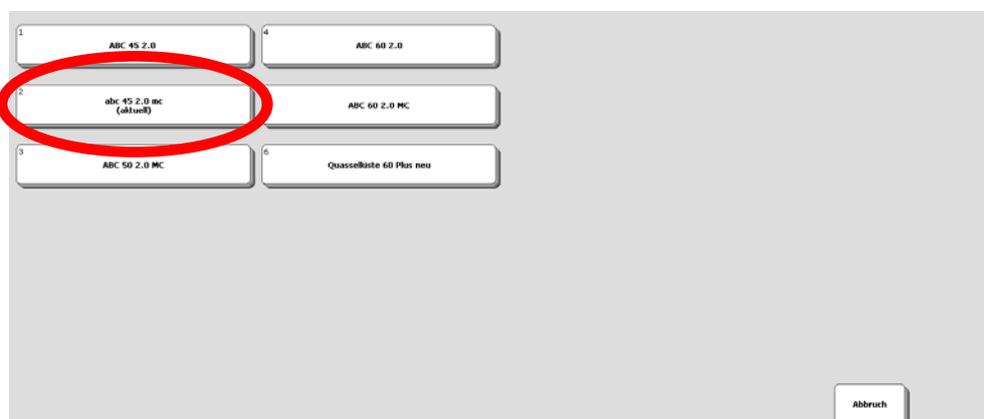


Wählen Sie den Ordner, in dem die Datei gespeichert werden soll.  
Geben Sie mit Hilfe der angezeigten Schrifttastatur einen Dateinamen ein

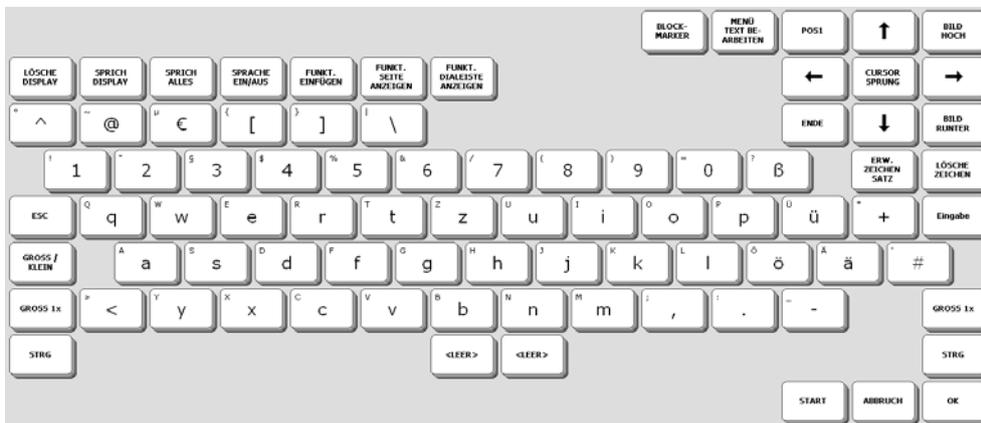

Bestätigen Sie die Eingabe mit <OK>.

Wenn die Speicherübertragung beendet ist, erscheint eine entsprechende Meldung im Display:

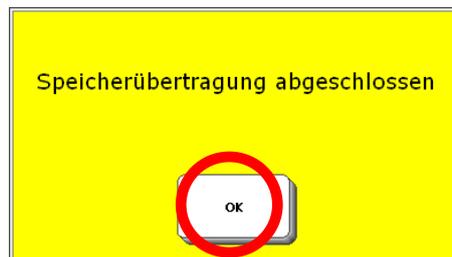

Drücken Sie <OK> im gelben Feld und danach zweimal <OK>, um das Menü zu beenden.

## **Benutzerbereich laden**

Wenn Sie eine Datei zurück in den Talker laden möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Haben Sie die Datei auf einem USB-Stick, so schließen Sie diesen an den Talker an.
2. Toolbox öffnen
3. <Menü Speicherübertragung>
4. <Benutzerbereich laden>
5. Benutzerbereich auswählen, in den die Datei geladen werden soll
6. Die im aktuellen Ordner vorhandenen Dateien werden angezeigt
7. Wechseln Sie ggf. zu dem Ordner, der die zu ladende Datei enthält.
8. Wählen Sie die zu ladende Datei aus.
9. Die Speicherübertragung wird durchgeführt.
10. Drücken Sie <OK> im gelben Feld und danach <OK>, um das Menü zu beenden.
11. <START> bringt Sie zurück zum Start des Programms.

**Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Talker!**

