

PRD-IDEEN DES MONATS

wo – da – nicht

Magische Taschenlampenbilder

Gehen Sie auf Entdeckungsreise – mit unseren magischen Taschenlampenbildern.

DIESE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:

- Klarsichthülle
- Folienstifte
- Schere
- schwarzer Tonkarton
- weißer Tonkarton

DIESE PRD-PRODUKTE KÖNNEN EINGESETZT WERDEN:

- MINSPEAK®-Anwendungsprogramme Quasselkiste 45/60 oder Wortstrategie 84
- Anwendungsprogramme LoGoFoXX 32 oder LoGoFoXX 60
- Anwendungsprogramme Metatalk DE 5x9 oder Metatalk DE 6x11
- Wortschatz-App GoTalk Now
- GoTalk9+ oder GoTalk20+
- 1-2 sprechende Tasten (z.B. Step-by-Step oder 2 BIGmacks)

DAS GEHÖRT ZUR VORBEREITUNG:

- Verwendet Ihr Talkerbenutzer ein Anwendungsprogramm, drucken Sie die Datei mit den Sequenzen des entsprechenden Programms aus.
- Verwendet Ihr Benutzer die Wortschatz-App GoTalk Now, laden Sie die Vorlage "PRD-Idee November 2021" von unserer Homepage herunter (<https://www.prentke-romich.de/didaktische-materialien-fuer-prio-geraete/#1590655769353-345f93a2-af40>).
- Zur Benutzung des GoTalks verwenden Sie das beigefügte Deckblatt. Besprechen Sie das Gerät gemäß den Vorschlägen.
- Beim Einsatz sprechender Tasten kennzeichnen Sie die Geräte mit den Symbolen und nehmen die entsprechenden Aussagen auf.
- Wählen Sie eine der Malvorlagen aus oder gestalten Sie eine eigene. Schieben Sie die A5 Malvorlage in die Klarsichthülle und schneiden Sie die Klarsichthülle bündig auf A5 ab.
- Zeichnen Sie die Tiere oder Buchstaben mit Folienstiften nach, so dass sie auf der Klarsichthülle zu sehen sind.
- Nehmen Sie die Malvorlage wieder heraus und schieben Sie stattdessen den schwarzen Tonkarton im A5 Format ein. Die Tiere bzw. Buchstaben werden unsichtbar.
- Basteln Sie eine „Papp-Taschenlampe“ mit einem schwarzen Griff und einem weißen Kegel in einer Größe, dass jeweils einer der Gegenstände „beleuchtet“ werden kann.

JETZT KANN ES LOSGEHEN!

- Schauen Sie sich zusammen mit Ihrem Benutzer das magische Bild an. Zunächst ist nichts zu erkennen, aber mit Hilfe der „Papp-Taschenlampe“ können Sie Tiere oder Buchstaben sichtbar machen: Bewegen Sie die „Papp-Taschenlampe“ einfach zwischen der Klarsichthülle und der schwarzen Pappe.
- Entscheiden Sie gemeinsam, wonach Sie zuerst suchen wollen. Modellieren Sie z.B. auf dem Talker „wo ist Katze“.
- Führen Sie den Lichtkegel nach und nach an verschiedene Stellen und lassen Sie Ihren Benutzer kommentieren: „da nicht“ / „da nicht“ / ... / „da“.
- Suchen Sie gemeinsam auch nach den weiteren Tieren bzw. Buchstaben, regen Sie Ihren Benutzer dazu an, die Suche zu kommentieren.
- Alles gefunden? Vielleicht haben Sie Lust, noch ein eigenes Taschenlampenbild zu gestalten und erneut auf Entdeckungsreise zu gehen?

PRD-IDEEN DES MONATS

SO KANN ES WEITERGEHEN:

- Vermitteln Sie den Einsatz der Wörter „wo“, „da“ und „nicht“ auch in anderen Spiel- und Alltagssituationen. Weitere Ideen finden Sie in der Datei „Zielwörter und Kurzideen“.

VIDEO ZU DIESER IDEE:

- Die Videobeschreibung dieser Idee finden Sie hier: https://youtu.be/qNn_EgK_Z34.

Die „PRD-Ideen des Monats“ sind ein kostenloser Service der Prentke Romich GmbH. Nutzung auf eigene Gefahr. Die Prentke Romich GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die aus der Befolgung der hier gemachten Angaben resultieren könnten. Das Ein- bzw. Austragen in den Newsletter erfolgt unter www.prentke-romich.de.

Prentke Romich GmbH

Hilfsmittel für Unterstützte Kommunikation
Karthäuserstr. 3
34117 Kassel
Tel. (0561) 78559-0
Fax (0561) 78559-29
E-Mail info@prentke-romich.de
Web www.prentke-romich.de

