

PRD-IDEEN DES MONATS

ich bin – du bist – jetzt

Paare finden

Das bekannte und in fast jedem Haushalt vorhandene Merkspiel „Memory“ kann gut zum Kommentieren der gemeinsamen Handlungen genutzt werden.

DIESE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:

- ein beliebiges Memory-Spiel

DIESE PRD-PRODUKTE KÖNNEN EINGESETZT WERDEN:

- MINSPEAK®-Anwendungsprogramme Quasselkiste 45/60 oder Wortstrategie 84
- Anwendungsprogramme LoGoFoXX 32 oder LoGoFoXX 60
- Anwendungsprogramme MetaTalkDE 5x9 oder MetaTalkDE 6x11
- Wortschatz-App GoTalk Now
- GoTalk9+ oder GoTalk20+
- QuickTalker 12 oder QuickTalker 23
- 1-2 sprechende Tasten (z.B. Step-by-Step oder 2 BIGmacks)

DAS GEHÖRT ZUR VORBEREITUNG:

- Verwendet Ihr Talkerbenutzer ein Anwendungsprogramm, drucken Sie die Datei mit den Sequenzen des entsprechenden Programms aus.
- Verwendet Ihr Benutzer die Wortschatz-App GoTalk Now, laden Sie die Vorlage "PRD-Idee Januar 2022" aus der Online Galerie oder von unserer Homepage herunter (<https://www.prentke-romich.de/didaktische-materialien-fuer-priogeraete/#1590655769353-345f93a2-af40>).
- Zur Benutzung des GoTalks oder QuickTalkers verwenden Sie das beigegefügte Deckblatt. Besprechen Sie das Gerät gemäß den Vorschlägen.
- Beim Einsatz sprechender Tasten kennzeichnen Sie die Geräte mit den Symbolen und nehmen die entsprechenden Aussagen auf.

JETZT KANN ES LOSGEHEN!

- Zunächst werden alle Kärtchen gemischt und verdeckt auf einem Tisch verteilt.
- Wer darf anfangen? Und wer ist dran? Modellieren Sie die Zieläußerungen „ich bin“, „ich bin jetzt“ etc.
- Jeder Mitspieler darf reihum zwei Kärtchen aufdecken. Passen die Karten nicht zusammen, werden die Karten an derselben Stelle belassen und wieder umgedreht. Kommentieren Sie die Aktivität beispielsweise mit „doof“, „Mist“ oder „passt nicht“.
- Werden zwei gleiche Karten aufgedeckt, kann mit „passt zusammen“ kommentiert werden. Der Spieler hat diese Karten gewonnen und darf sie behalten. Wie „toll“!
- Zusätzlich kommt der Spieler „nochmal“ zum Zug.
- Das Spiel ist beendet, wenn alle Kartenpaare gefunden worden sind, und Sieger ist jener Spieler, der die meisten Pärchen gefunden hat. Wer hat „gewonnen“ und wer hat „verloren“?

SO KANN ES WEITERGEHEN:

- Vermitteln Sie den Einsatz der Äußerungen „ich bin“, „du bist“ und „jetzt“ auch in anderen Spiel- und Alltagssituationen. Weitere Ideen finden Sie in der Datei „Zielwörter und Kurzi-deen“.

VIDEO ZU DIESER IDEE:

- Die Videobeschreibung dieser Idee finden Sie hier:
<https://www.youtube.com/watch?v=pasLQJTIKvc>

PRD-IDEEN DES MONATS

Die „PRD-Ideen des Monats“ sind ein kostenloser Service der Prentke Romich GmbH. Nutzung auf eigene Gefahr. Die Prentke Romich GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die aus der Befolgung der hier gemachten Angaben resultieren könnten. Das Ein- bzw. Austragen in den Newsletter erfolgt unter www.prentke-romich.de.

Prentke Romich GmbH

Hilfsmittel für Unterstützte Kommunikation

Karthäuserstr. 3

34117 Kassel

Tel. (0561) 78559-0

Fax (0561) 78559-29

E-Mail info@prentke-romich.deWeb www.prentke-romich.de