

PRD-IDEEN DES MONATS

aus - schneiden

Gemüsegesicht

Wir stellen Gemüsegesichter her. Hierbei darf jeder selbst entscheiden, wie sein persönliches Gemüsegesicht aussehen soll.

DIESE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:

- Gurke, Möhre, Paprika, Tomaten
- Toastbrot
- Schneidebrett, Messer, Sparschäler
- Teller

DIESE PRD-PRODUKTE KÖNNEN EINGESETZT WERDEN:

- MINSPEAK®-Anwendungsprogramme Quasselkiste 45/60 oder Wortstrategie 84
- Anwendungsprogramme LoGoFoXX 32 oder LoGoFoXX 60
- Anwendungsprogramme Metatalk DE 5x9 oder Metatalk DE 6x11
- Wortschatz-App GoTalk Now
- GoTalk9+ oder GoTalk20+
- QuickTalker 12 oder QuickTalker 23
- 1 sprechende Taste (z.B. Step-by-Step)

DAS GEHÖRT ZUR VORBEREITUNG:

- Verwendet Ihr Talkerbenutzer ein Anwendungsprogramm, drucken Sie die Datei mit den Sequenzen des entsprechenden Programms aus.
- Bei Nutzung des Anwendungsprogramms Quasselkiste 45 speichern Sie bitte das Wort „schneiden“ unter der vorgeschlagenen Sequenz ab.
- Verwendet Ihr Benutzer die Wortschatz-App GoTalk Now, laden Sie die Vorlage "PRD-Idee Maerz 2022" aus der Online Galerie oder von unserer Homepage herunter (<https://www.prentke-romich.de/didaktische-materialien-fuer-priogeraete/#1590655769353-345f93a2-af40>).
- Zur Benutzung des GoTalks oder QuickTalkers verwenden Sie das beigegefügte Deckblatt. Besprechen Sie das Gerät gemäß den Vorschlägen.
- Beim Einsatz einer sprechenden Taste kennzeichnen Sie das Gerät mit dem Symbol und nehmen die entsprechenden Aussagen schrittweise auf.

JETZT KANN ES LOSGEHEN!

- Jeder, der mitmacht, darf sein ganz persönliches Gemüsegesicht herstellen. Zeigen Sie dafür, welche Gemüsesorten zur Verfügung stehen.
- Jeder entscheidet nun selbst, wie sein Gemüsegesicht aussehen soll, z.B. „Nase aus Paprika“ / „Mund aus Möhre“ / „Auge aus Tomate“ / „Haare aus Paprika“.
- Je nach Benutzer kann zusätzlich entschieden werden, ob z.B. die „Haare lang“ oder „kurz“ sein sollen, ob „mehr Haare“ gebraucht werden oder schon „genug Haare“ da sind, ob die Nase, der Mund oder die Augen „groß“ oder „klein“ werden sollen.
- Oder der Benutzer kann kommentieren, z.B. „Tomate schneiden“.
- Bevor die Gemüsegesichter verspeist werden, sollte natürlich bestaunt werden, wie toll und individuell die verschiedenen Gesichter geworden sind.

SO KANN ES WEITERGEHEN:

- Vermitteln Sie den Einsatz der Wörter „aus“ und „schneiden“ auch in anderen Spiel- und Alltagssituationen. Weitere Ideen finden Sie in der Datei „Zielwörter und Kurzideen“.

PRD-IDEEN DES MONATS

VIDEO ZU DIESER IDEE:

- Die Videobeschreibung dieser Idee finden Sie hier:
<https://www.youtube.com/watch?v=ztxbexSzpE4>

Die „PRD-Ideen des Monats“ sind ein kostenloser Service der Prentke Romich GmbH. Nutzung auf eigene Gefahr. Die Prentke Romich GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die aus der Befolgung der hier gemachten Angaben resultieren könnten. Das Ein- bzw. Austragen in den Newsletter erfolgt unter www.prentke-romich.de.

Prentke Romich GmbH

Hilfsmittel für Unterstützte Kommunikation
Karthäuserstr. 3
34117 Kassel
Tel. (0561) 78559-0
Fax (0561) 78559-29
E-Mail info@prentke-romich.de
Web www.prentke-romich.de

