



Bedienungsanleitung

Accent 1000

Hardware

Accent 1000-30
100010v3

PRD 
Prentke Romich Deutschland
Unterstützte Kommunikation

Hinweise

Accent 1000-30 Bedienungsanleitung © Prentke Romich GmbH 2022. Kommerzielle Nutzung und Weiterveräußerung verboten.

Accent, AeroSwitch, Empower, Look, NuEye, NuPoint und NuVoice sind Warenzeichen von PRC-Saltillo.

MINSPEAK® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Semantic Compaction Systems.

Deutsche Wortstrategie und Quasselkiste sind Warenzeichen der Semantic Compaction Systems.

Acapela Mobility, Acapela Multimedia und ELAN sind Warenzeichen der Acapela Group.

Vocalizer Expressive ist ein Warenzeichen der Nuance Communications, Inc.

Bluetooth-Wortmarke und -Logo sind

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc und werden von PRC-Saltillo in Lizenz verwendet.

CAVIWIPES ist ein Warenzeichen der Metrex Research LLC.

Intel und Intel Atom sind Warenzeichen der Intel Corporation oder ihrer Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Velcro ist ein eingetragenes Warenzeichen der Velcro BVBA.

Wi-Fi ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.

CAVIWIPES ist ein eingetragenes Warenzeichen der Metrex Research LLC

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden. Prentke Romich GmbH geht damit keinerlei Verpflichtung ein. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Prentke Romich GmbH sind die vollständige oder teilweise Fotokopie und Reproduktion dieses Handbuchs sowie die Übersetzung in andere Sprachen nicht zulässig.

Prentke Romich GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen für diese Unterlagen. Das gilt ohne Einschränkung auch für implizite Garantien auf Marktgängigkeit und Eignung dieses Geräts oder der hierin gemachten Angaben für einen bestimmten Zweck. Auch übernimmt die Prentke Romich GmbH über die gesetzliche Produkthaftung hinaus keine Haftung für irgendwelche Schäden, die sich aus der Anwendung und Nutzung dieses Geräts oder der in dieser Anleitung Buch gemachten Angaben ergeben.

| Hersteller | Der Bevollmächtigte in der EU | Importeur |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Prentke Romich Company 1022 Heyl Road Wooster, OH 44691 U.S.A. Tel. +1 330 262-1984 Fax +1 330 262-4829 E-Mail info@prentrom.com Web prentrom.com | Prentke Romich GmbH Karthäuserstr. 3 D - 34117 Kassel Germany Tel. +49 (0) 561 7 85 59-0 Fax +49 (0) 561 7 85 59-29 E-Mail info@prentke-romich.de Web prentke-romich.de | Prentke Romich GmbH Karthäuserstr. 3 D - 34117 Kassel Germany Tel. +49 (0) 561 7 85 59-0 Fax +49 (0) 561 7 85 59-29 E-Mail info@prentke-romich.de Web prentke-romich.de |

Dokumentenversion

100010v3 – 11.03.2022

Bezieht sich auf Modell Accent 1000-30 (Seriennummern 10000AC10 und höher) mit Software „NuVoice“ oder Software „Empower“.

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|-----------|
| Hinweise | 2 |
| Sicherheitshinweise | 4 |
| DEN ACCENT 1000 KENNEN LERNEN | 11 |
| Die Vorderseite des Accent 1000 | 12 |
| Die Rückseite des Accent 1000 | 13 |
| Die Oberseite des Accent 1000 | 14 |
| Die linke und die rechte Seite des Accent 1000 | 15 |
| Das Gerät einschalten | 16 |
| Den Touchscreen benutzen | 16 |
| Den Akku laden | 17 |
| Aufstellbügel verwenden und demontieren | 19 |
| Griff demontieren und Portabdeckung montieren | 20 |
| Displayschutzfolie montieren | 21 |
| Rahmen demontieren | 22 |
| Rahmen montieren | 23 |
| Fingerführungsgitter montieren | 25 |
| Fingerführungsgitter hochklappen | 26 |
| Fingerführungsgitter demontieren | 26 |
| Fingerführungshilfe montieren | 27 |
| Fingerführungshilfe demontieren | 28 |
| Tragegurt befestigen | 29 |
| Befestigungsplatte für Halterungssysteme montieren | 30 |
| Eyetracker montieren | 31 |
| Kopfmaus NuPoint montieren | 32 |
| HDMI-Ausgang verwenden | 33 |
| Computersteuerung | 35 |
| Drahtlose Internetverbindung einrichten | 36 |
| Windows-Energiemanagement | 38 |
| Den Accent 1000 benutzen | 39 |
| Transportschutzmodus aktivieren bei längerer Nichtbenutzung des Geräts | 40 |
| Gerät benutzen aus dem Transportschutzmodus | 40 |
| Reinigung & Desinfektion | 41 |
| Hygienische Wiederaufarbeitung des Geräts und/oder des Zubehörs | 43 |
| Hinweise zum Wiedereinsatz | 44 |
| FEHLERSUCHE UND PROBLEMBEHEBUNG | 45 |
| Akku-Problembefhebung | 46 |
| Pannenhilfe | 47 |
| Windows-Fehlersuche | 48 |
| ANHANG | 51 |
| Konformitätsinformationen | 52 |
| Endkunden-Lizenzvereinbarung | 58 |
| INDEX | 59 |

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit internationalen Sicherheitsstandards entwickelt und hergestellt. Wie bei jedem anderen Elektrogerät müssen Sie jedoch die gebührende Vorsicht walten lassen, um eine optimale Funktionsweise und Sicherheit zu gewährleisten. Netzkabel, Netzteile und andere Komponenten können Sicherheitsrisiken erzeugen, die vor allem bei nicht sachgerechter Verwendung dieser Komponenten zu Personen- oder Sachschäden führen können. Um diese Risiken zu verringern, folgen Sie den in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen, beachten Sie alle Warnungen, die sich auf dem Produkt und in den Bedienungsanweisungen befinden, und lesen Sie die Informationen in dieser Anleitung sorgfältig. Sie können sich selbst vor Gefahren schützen und eine sichere Umgebung für die Nutzung dieses Geräts schaffen, indem Sie die Informationen in dieser Anleitung genau einhalten.

Wichtige Informationen zur Verwendung Ihrer Kommunikationshilfe

Beachten Sie stets die nachfolgend aufgeführten Hinweise. Andernfalls kann es zu Hautreizungen oder Verletzungen kommen, oder am Gerät können Fehler auftreten.

Schützen Sie sich vor der vom Gerät erzeugten Wärme.

Wenn dieses Gerät eingeschaltet ist oder der Akku aufgeladen wird, können die Unterseite und andere Komponenten der Kommunikationshilfe Wärme abgeben. Welche Temperatur erreicht wird, richtet sich nach der Systemaktivität und dem Ladezustand des Akkus.

Ein längerer Hautkontakt kann sogar durch die Kleidung hindurch zu Hautirritationen oder im schlimmsten Fall zu Hautverbrennungen führen.

- Vermeiden Sie es, die Komponenten der Kommunikationshilfe, die sich erwärmen, über einen längeren Zeitraum mit den Händen, den Oberschenkeln oder einem anderen Körperteil zu berühren.

Schützen Sie sich vor der vom Netzteil erzeugten Wärme

Das Netzteil erwärmt sich, wenn es an die Kommunikationshilfe angeschlossen und mit einer Netzsteckdose verbunden ist. Ein längerer Hautkontakt kann sogar durch die Kleidung hindurch zu Hautverbrennungen führen.

- Vermeiden Sie es, das Netzteil über einen längeren Zeitraum zu berühren, wenn Sie es verwenden.
- Verwenden Sie ein Netzteil niemals, um z. B. Ihre Hände aufzuwärmen.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Netzteil.

Schützen Sie dieses Gerät vor Feuchtigkeit.

Bewahren Sie in der Nähe dieses Geräts keine Flüssigkeiten auf, um das Verschütten von Flüssigkeiten auf dieses Gerät und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden.

Schützen Sie die Kabel vor Beschädigungen

Behandeln Sie Kabel immer sorgfältig; beschädigen oder knicken Sie sie nicht. Verlegen Sie Leitungen und Kabel von Netzteilen, externen Eingabegeräten und anderen elektronischen Geräten so, dass sie nicht von diesem Gerät oder von anderen Objekten eingeklemmt werden. Benutzer nicht über die Kabel stolpern oder darauf treten können und der Betrieb der Kommunikationshilfe nicht auf andere Weise behindert wird.

Gehen Sie vorsichtig mit diesem Gerät um

Vermeiden Sie Erschütterungen der Kommunikationshilfe wie z. B. Stöße, Fallenlassen, Vibrationen und Verdrehungen, und vermeiden Sie Kratzer an den Einheiten. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Gerät ab.

Gehen Sie beim Transport der Kommunikationshilfe vorsichtig vor

- Wählen Sie für den Transport einen qualitativ hochwertigen Transportbehälter wie die optional erhältliche Transporttasche, durch den Erschütterungen aufgefangen werden und das Gerät geschützt ist.
- Verstauen Sie das Gerät nicht in einem vollen Koffer oder in einer vollen Tasche.
- Bevor Sie das Gerät in einen Transportbehälter legen, schalten Sie es aus, versetzen Sie es in den Energiesparmodus oder aktivieren Sie den Transportschutzmodus.
- Legen Sie das Gerät nicht in den Transportbehälter, solange es noch eingeschaltet ist.








Situationen, in denen sofort reagiert werden muss

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass einer der folgenden Umstände eintritt, oder wenn Sie irgendwelche Sicherheitsbedenken bezüglich Ihres Produkts haben, beenden Sie die Verwendung des Produkts, und unterbrechen Sie die Verbindung zur Stromquelle, bis Sie mit dem technischen Support Kontakt aufnehmen können und Anweisungen zur weiteren Vorgehensweise erhalten.

- Netzkabel, Netzstecker, Netzteile, Verlängerungskabel oder Überspannungsschutzeinrichtungen sind rissig, brüchig oder beschädigt.
- Anzeichen von Überhitzung wie Rauch, Funken oder Feuer treten auf.
- Geräusche wie Knacken, Rauschen, Knallen oder strenge Gerüche gehen von dem Produkt aus.
- Anzeichen dafür treten auf, dass eine Flüssigkeit auf die Kommunikationshilfe, das Netzkabel oder das Netzteil verschüttet wurde oder ein Gegenstand auf eines dieser Teile gefallen ist.
- Die Kommunikationshilfe, das Netzkabel oder das Netzteil sind mit Wasser in Berührung gekommen.
- Das Produkt wurde fallen gelassen oder auf irgendeine andere Weise beschädigt.
- Das Produkt funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Sie die Bedienungsanweisungen befolgen.

Erläuterung der verwendeten Warnsymbole

In diesem Handbuch werden sieben (7) Warnsymbole zur Anzeige unterschiedlicher Warnstufen verwendet:

| | |
|---|--|
|  | Das Symbol „Hinweis“ soll den Benutzer auf wichtige Hinweise oder Punkte, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen, aufmerksam machen. |
|  | Das Symbol „Tipps“ weist auf Punkte hin, an die der Benutzer möglicherweise nicht gedacht hat. |
|  | Das Symbol „Achtung“ wird verwendet, um auf etwas hinzuweisen, das Schäden oder Fehlfunktionen an der Ausrüstung verursachen kann. |
|  | Das Symbol „Gefahr“ wird verwendet, um darauf hinzuweisen, dass ein erhebliches Schadensrisiko für den Benutzer besteht, wenn der Warnhinweis nicht beachtet wird. |
|  | Das Symbol „Hohe Lautstärke“ wird verwendet, um auf etwas hinzuweisen, das Hörschäden verursachen kann. |
|  | Das Symbol „Hohe Temperatur“ weist auf hohe Oberflächentemperaturen hin, die zu Verletzungen führen oder unangenehme Empfindungen auslösen können. |
|  | Das Symbol „Bitte von Kindern unter 3 Jahren fernhalten“ weist auf Erstickengefahr durch Verschlucken kleiner Teile sowie auf Verletzungsgefahr durch scharfe Spitzen und Kanten einzelner Bauteile hin. |

Sicherheit

Notfallgerät



Dieses Gerät ist nicht gedacht oder geeignet als Notrufgerät oder als alleinige Kommunikationshilfe. Falls dieses Gerät ausfällt, kann es vom Benutzer nicht zur Kommunikation verwendet werden.

Reinigung, Wartung, Service



Das Gerät nicht reinigen oder warten, während es in Benutzung ist. Ziehen Sie das Ladegerät ab und schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen, hygienisch aufarbeiten oder eine Wartung durchführen.



Ist das Gerät oder ein Zubehörteil beschädigt, wenden Sie sich an den Kundendienst des Händlers, von dem Sie das Gerät bekommen haben. Versuchen Sie nicht, Reparaturen selber durchzuführen.

Zubehör



Verwenden Sie keine Zubehörteile, abnehmbare Teile oder Materialien, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind.



Verwenden Sie Zubehörteile, abnehmbare Teile und Materialien nur wie in dieser Anleitung beschrieben.

Montage und Positionierung



Zur Vermeidung von Muskel-, Gelenk- und Skeletterkrankungen (RSI, Repetitive Strain Injury) darf die Positionierung des Geräts nur durch qualifiziertes Personal erfolgen.



Tisch- und Rollstuhhalterungen sowie Bett- bzw. Bodenständer (Floor Mount) sind nur durch qualifiziertes Personal aufzubauen und einzustellen. Bei fehlerhaft montierten oder befestigten Halterungen droht erhebliches Verletzungsrisiko!



Augengesteuerte Geräte müssen zum Betrieb stets an einer Halterung (Tischständer, Rollstuhhalterung, Bettständer oder Bodenständer) montiert sein.



Betreiben Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es nur schwer zugänglich ist oder wo das Ladegerät nicht einfach angeschlossen und ausgestöpselt werden kann.

Beschädigung



Benutzen Sie das Look-Modul nicht, wenn die Oberfläche (Filterscheibe) beschädigt ist.

Seh- und Hörvermögen



Wenn Sie eine Brille benutzen, konsultieren Sie Ihren Augenarzt oder Augenoptiker bzgl. einer Nutzung und der Positionierung des Geräts.



Vermeiden Sie bei Benutzung eines Kopfhörers hohe Lautstärken, da diese auf Dauer das Gehör beeinträchtigen können. Wählen Sie eine geringe Lautstärke und erhöhen Sie diese ggf. nur leicht, um komfortabel hören zu können.

Kleinteile, Kabel, Leitungen, Aufstellfuß, Gurte und Ösen



Kabel, Leitungen, Gurte und Ösen stellen eine Gefährdung durch Erfassen oder Aufwickeln sowie ein potenzielles Strangulationsrisiko dar. Berücksichtigen Sie dies beim Positionieren des Geräts sowie beim Anschluss von Zubehör wie externen Tasten.



Kleinteile wie Schrauben, Adapter, Gurte, Ösen und Kabel nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen, es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!



Prüfen Sie Stecker und Kabel regelmäßig auf Beschädigungen. Im Falle einer Beschädigung schalten Sie das Gerät umgehend aus und wenden Sie sich an den Kunden-

dienst des Herstellers.



Wenn Sie ein Kabel abziehen, halten Sie es am Stecker und ziehen Sie nicht am Kabel. Anderenfalls riskieren Sie eine Beschädigung des Kabels / der Leitung.



Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie neue oder zusätzliche Komponenten (Netzteil, Tasten, Kabel, Speichermedien etc.) anschließen oder entfernen.



Schließen Sie kabelgebundenes Zubehör nur wie in dieser Anleitung beschrieben an.



Bei Benutzung des ausklappbaren Aufstellfußes besteht Gefahr des Einklemmens oder Quetschens von Fingern.



Wenn Sie den ausklappbaren Ständer demontieren, verwahren Sie ihn an einem sicheren Ort. Beim Herumspielen mit dem Ständer besteht die Gefahr von Augenverletzungen!



Verwahren Sie den mitgelieferten USB-Stick bei Nichtbenutzung an einem sicheren Ort und lassen Sie ihn nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen. Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!



Verwahren Sie den optional mitgelieferten Stylus bei Nichtbenutzung an einem sicheren Ort und lassen Sie ihn nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen. Beim Herumspielen mit dem Stylus besteht die Gefahr von Augenverletzungen!

Bildschirm



Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Bildschirm beschädigt, gesplittert oder zerbrochen ist.



Entfernen Sie den Touchscreen (die berührungsempfindliche Schicht auf dem Display) nicht. Der Touchscreen schützt Sie vor Glassplittern im Falle eines Displaybruchs.

Interferenzen



Wenn Sie dies Gerät in einer medizinischen Umgebung benutzen, folgen Sie den Anweisungen für mobile Geräte und Smartphones.



Verwenden Sie dies Gerät nicht in der Nähe von Geräten, die elektromagnetische Störungen verursachen, es können Interferenzen auftreten. Entfernen Sie sich wenn möglich von der Störquelle.

Feuchtigkeit



Das Gerät niemals in Wasser eintauchen oder in feuchten Räumen betreiben. Vor Feuchtigkeit schützen!



Ist das Gerät mit Feuchtigkeit in Berührung gekommen, schalten Sie es umgehend aus. Lassen Sie das Gerät vor dem Wiedereinschalten komplett trocknen. Feuchtigkeit in den USB-Buchsen können Sie entfernen, indem Sie das Gerät mit dem USB-Buchse nach unten richten und es mehrfach stark schütteln. Trocken Sie anschließend die USB-Buchse mit reinem Mikrofasertuch. Wiederholen Sie den Vorgang so lange, bis sich keine Feuchtigkeit mehr in der / den USB-Buchse(n) befindet.

Ermüdung



Bei Verwendung der Augensteuerung: Legen Sie regelmäßig Pausen bei der Benutzung ein, vor allem wenn Sie erst anfangen, ein Augensteuerungsgerät zu benutzen.



Bei Verwendung der Augensteuerung: Legen Sie Pausen bei der Benutzung ein, wenn die Nutzung der Augensteuerung Sie ermüdet oder wenn Sie trockene Augen bekommen.


Krampfanfälle




Bei Verwendung der Augensteuerung: Personen mit photosensitiver Epilepsie können anfällig sein für epileptische Anfälle oder Bewusstlosigkeit, wenn sie im alltäglichen Leben bestimmten Blinklichtern, Lichtmustern oder der Lichtquelle des Eyetrackers


ausgesetzt sind. Solche Personen sollten das Gerät nicht unbeaufsichtigt verwenden. Der Benutzer sollte schnellstmöglich vom Gerät entfernt werden, wenn eines der folgenden Verhalten beobachtet wird: unwillkürliche Bewegungen, Desorientierung, Krämpfe, Zuckungen, Verlust des Bewusstseins oder Sehstörungen!

Infrarotstrahlung


 Bei Verwendung der Augensteuerung: Das Look-Modul sendet impulsartiges Infrarotlicht (IR) aus. Bestimmte medizinische Geräte sind anfällig für Störungen durch IR-Licht und/oder IR-Strahlung. Verwenden Sie die Augensteuerung daher nicht in der Nähe solcher Geräte. Ist Ihnen nicht klar, ob ein medizinisches Gerät empfindlich gegen Infrarotstrahlung ist, konsultieren Sie den Hersteller des Geräts.


 Bei Verwendung der Augensteuerung: Haben Sie Fragen zur Empfindlichkeit eines medizinischen Geräts gegenüber Infrarotstrahlung des Look-Moduls, konsultieren Sie den Hersteller des Geräts oder Ihren Gesundheitsdienstleister.


Wichtiger Hinweis bei Nutzung eines Pulsoximeters


 Bei Verwendung der Augensteuerung: Pulsoximeter sind empfindlich gegenüber bestimmten Wellenlängen des Umgebungslichts wie z. B. direkte Sonneneinstrahlung oder Infrarotlicht. Um die gewünschten Ergebnisse unter allen Lichtbedingungen zu erhalten, empfehlen Hersteller von Pulsoximetern i. d. R. das Abdecken des Pulsoximeter-Sensors mit einem lichtundurchlässigen Material. Alternativ können Sie versuchen, den Sensors des Pulsoximeters unter der Augensteuerung zu positionieren. Das Abdecken des Sensors mit einem lichtundurchlässigen Material bietet einen zuverlässigeren Schutz gegen reflektiertes Infrarotlicht und andere Fremdlichteinflüsse.


Batterien und Laden


 Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil zum Laden der in das Gerät eingebauten Akkus.


 Verwenden Sie das Gerät nicht an unübersichtlichen Stellen oder an Orten, wo das Netzteil nicht einfach abgezogen werden kann.


 Befolgen Sie zum Laden des Geräts immer die in dieser Anleitung gemachten Angaben.


 Führen Sie keine Objekte in die Ladebuchse(n) ein, da diese die Buchse(n) beschädigen könnten.


 Zur Vermeidung eines Kurzschlusses oder eines Schadens am Gerät, laden Sie das Gerät nicht, wenn es nass ist oder in einer Umgebung, wo es nass werden könnte.

 Bedienen Sie das Gerät, das Netzteil oder Zubehörteile nicht mit feuchten oder nassen Händen.


 Laden Sie das Gerät nur sicheren, trockenen Umgebungen. Laden Sie das Gerät nicht außerhalb geschlossener Räume.


 Halten Sie das Ladegerät fern von Wasser und stellen Sie sicher, dass es keiner Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

 Bei Ladegeräten mit mehreren Ländersteckern, verwahren Sie nicht benötigte Länderstecker an einen sicheren Ort auf. Ladestecker nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen, es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

 Ist das Ladegerät oder dessen Zuleitung beschädigt, darf es nicht mehr verwendet werden. Wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst.

Wärme

 Legen Sie das Gerät nicht in eine Mikrowelle oder einen Backofen und halten Sie es von offenen Flammen, Feuer und anderen Wärmequellen fern.

 Lassen Sie das Geräte nicht offen im Fahrzeug liegen, es könnte dort sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sein.

Umgebung



Bringen Sie das Gerät nicht in sauerstoffreiche Umgebungen (Operationsräume, Sauerstoffzelte etc.).



Benutzen Sie das Gerät nicht in Gegenwart von explosiven oder brennbaren Gasen.

Die Oberfläche berühren



Das Berühren der Geräteoberfläche mit einer Hautverletzung kann die Wunde verschärfen



Kinder und andere Risikogruppen sollten die Geräteoberfläche nicht berühren, wenn die Möglichkeit einer Verbrennung besteht

Entsorgung



Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für gebrauchte elektronische Produkte, über das die richtige Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung gemäß der bestehenden Gesetzgebung gewährleistet wird. Privathaushalte in den Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen können ihre gebrauchten elektronischen Produkte an vorgesehenen Sammeleinrichtungen kostenfrei abgeben oder aber an den Händler zurückgeben, von dem sie es erworben haben.

Implantierbare Medizinprodukte



Halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zwischen diesem tragbaren Gerät und einem implantierten Gerät wie Schrittmacher oder Kardioverter-Defibrillator, um potenzielle Interferenzen mit diesem Gerät zu vermeiden.

Menschen, denen ein Gerät wie ein Schrittmacher oder Kardioverter-Defibrillator implantiert wurde, sollten

- IMMER einen Mindestabstand von mindestens 15 cm zwischen diesem Gerät und dem implantierten Gerät einhalten, solange dieses Gerät eingeschaltet ist;
- dieses Gerät nicht in einer Tasche oder am Gurt in einem Abstand von weniger als 15 cm vom implantierten Gerät tragen, da dieses Gerät nach dem Einschalten – auch dann, wenn es nicht verwendet wird – Signale aussenden kann. Dieses Gerät sollte stets auf der dem implantierten Gerät ABGEWANDTEN Seite getragen werden;
- dieses Gerät **SOFORT AUSSCHALTEN**, wenn die Gefahr einer Interferenz besteht.
- alle Anweisungen des Herstellers des implantierten Geräts lesen und befolgen. Haben Sie Fragen zur Verwendung dieses Geräts in Verbindung mit einem implantierten Gerät, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst des Herstellers des implantierten Geräts.

DEN ACCENT 1000 KENNEN LERNEN

Die Vorderseite des Accent 1000



| | |
|----|-------------------------|
| 1 | Griff |
| 2 | Öse für Tragegurt |
| 3 | Ein/Aus-Taste |
| 4 | Helligkeitssensor |
| 5 | Kamerabetriebsanzeige |
| 6 | Vordere Kamera |
| 7 | Akku-/Lade-Anzeige |
| 8 | Betriebsanzeige |
| 9 | Lautstärkewippe |
| 10 | Mikrofon |
| 11 | Display mit Touchscreen |
| 12 | TOOLS-Taste |

Die Rückseite des Accent 1000



| | |
|----|--|
| 1 | Griff |
| 2 | Mini-USB-Buchse für Kopfmaus NuPoint® (vom Griff verdeckt) |
| 3 | Befestigungspunkte (Gewindebuchsen) für Tragegriff oder Kopfmaus NuPoint® |
| 4 | Hintere Kamera |
| 5 | Schacht für Micro-SD-Karte |
| 6 | USB 3.0-Anschluss |
| 7 | Lautsprecher |
| 8 | USB 2.0-Anschluss |
| 9 | Mini-USB-Anschluss zur Ansteuerung externer Geräte |
| 10 | Befestigungspunkte (Gewindebuchsen) für Aufnahmeplatte für Gerätehalterung TBH |

| | |
|----|--|
| 11 | USB-Buchse für Augensteuerungsmodul „NuEye“ |
| 12 | Akkufach |
| 13 | Befestigungspunkte (Gewindebuchsen) für Augensteuerungsmodul „NuVoice“ |
| 14 | Ladebuchse |
| 15 | Tastenbuchse A |
| 16 | Tastenbuchse B |
| 17 | Kopfhörerbuchse |
| 18 | Micro-HDMI-Buchse |
| 19 | Ständer |

Die Oberseite des Accent 1000



| | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Ein/Aus-Taste |
| 2 | Reset-Knopf (erzwungenes Ausschalten) |
| 3 | Griff |
| 4 | Mikrofon |
| 5 | Anschluss für Kopfmaus NuPoint |
| 6 | Infrarotfenster |

Ein/Aus-Taste

Hiermit schalten Sie den Accent 1000 ein bzw. wecken ihn aus dem Standby-Modus auf. Die Taste kann mit *Stand-By-Modus* (empfohlen), *Ruhezustand* oder *Windows herunterfahren* belegt oder ganz deaktiviert werden. Näheres erfahren Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Kommunikationssoftware.

Reset-Knopf (erzwungenes Ausschalten)

Reagiert der Accent z. B. durch einen Windows-Absturz nicht mehr auf Eingaben, können Sie ein Ausschalten erzwingen, indem Sie eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung neben der Ein/Aus-Taste einführen und die darunter liegende Taste kurz drücken. Der Accent 1000 schaltet sich daraufhin ab. Drücken Sie anschließend die Ein/Aus-Taste, um den Accent wieder einzuschalten.



Kleinteile wie Büroklammern nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen, es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!



Beim Hantieren mit Büroklammern besteht die Gefahr von Augenverletzungen!

Infrarotfenster

Hinter dem Infrarotfenster befindet sich die lernfähige IR-Umfeldkontrolle. Um dem Talker IR-Befehle beizubringen, richten Sie die Fernbedienung des zu steuernden Geräts auf dieses Fenster, während Sie die Taste des zu lernenden Befehls drücken. Die IR-Signale, die der Talker aussendet, werden ebenfalls von hier aus ausgestrahlt.

Decken Sie den Bereich unterhalb des Griffes daher nicht ab, wenn Sie die Umfeldkontrolle nutzen wollen.

Der Griff behindert das Senden und Empfangen von IR-Signalen nicht.

Griff

Der Tragegriff kann demontiert und durch die Kopfmaus „NuPoint“ oder die Portabdeckung ersetzt werden. Setzen Sie unbedingt die Portabdeckung ein, wenn Sie den Griff demontieren und keine Kopfmaus NuPoint montieren.

Die linke und die rechte Seite des Accent 1000



| | |
|---|---|
| 1 | USB Mini-Port zur Ansteuerung externer Geräte |
| 2 | USB-2.0-Anschluss |
| 3 | USB-2.0-Anschluss |
| 4 | USB-3.0-Anschluss |
| 5 | Micro-SD-Karten-Schacht |



| | |
|---|---|
| 1 | Ladebuchse |
| 2 | Tastebuchse A |
| 3 | Tastebuchse B |
| 4 | Kopfhöreranschluss |
| 5 | Reset-Knopf (Verstärker) |
| 6 | Lautstärkewippe |
| 7 | Micro-HDMI-Buchse zum Anschluss eines externen Monitors oder Projektors |

Reset-Knopf (Verstärker)

Zwischen Tastebuchse A und B befindet sich der Reset-Knopf des Accent 1000-Verstärkers. Setzen Sie den Verstärker zurück, wenn der Accent nicht lädt, der Accent trotz eingeschalteter Sprache keine Sprache ausgibt oder an den Accent angeschlossene Eingabegeräte nicht erkannt werden. Sie setzen den Accent-Verstärker zurück, indem Sie eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung einführen und die darunter liegende Taste kurz drücken.



Kleinteile wie Büroklammern nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen, es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!



Beim Hantieren mit Büroklammern besteht die Gefahr von Augenverletzungen!

Das Gerät einschalten

1. Drücken und Halten Sie den I/O-Taste rechts oben auf dem Gerät.
2. Sobald ein Piepton ertönt, lassen Sie die Taste los. Die grüne LED beginnt zu leuchten



Die grüne LED leuchtet, solange das Gerät eingeschaltet oder im Standby-Modus ist.

3. Warten Sie ab, bis die Software gestartet hat.



Der Accent 1000 benötigt ca. 120 Sekunden, bis der Bootvorgang nach einem Neustart abgeschlossen und das Gerät zur Benutzung bereit ist.



Drücken Sie während des Startvorgangs NICHT noch einmal die Ein/Aus-Taste, sonst könnte der Accent 1000 in den Wiederherstellungsmodus umschalten.

Haben Sie versehentlich den Wiederherstellungsmodus aktiviert, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm oder wenden Sie sich an den technischen Service von PRD.

Die Wiederherstellung des Accent 1000 kann bis zu einer Stunde Zeit in Anspruch nehmen.

Den Touchscreen benutzen



Achtung: Verwenden Sie für das Drücken auf den Touchscreen keine scharfkantigen Objekte. Der Touchscreen ist gedacht zur Benutzung mit dem Finger oder dem mitgelieferten Stylus, der speziell zur Nutzung mit kapazitiven Displays konstruiert wurde. Andere Objekte können den Bildschirm beschädigen oder gar zerstören.



Unter dem Touchscreen befindet sich die Flüssigkristallanzeige (LCD). Für den unwahrscheinlichen Fall, dass das Display zerbricht und Kristallflüssigkeit auf die Haut gelangt, wischen Sie die Flüssigkeit ab und spülen Sie die betroffenen Stellen gründlich mit Wasser ab. Waschen Sie die betroffenen Stellen anschließend gründlich mit Seife. Achten Sie darauf, dass Sie nicht am zersplitterten Glas verletzen.

Der Touchscreen ist sehr berührungsempfindlich. Seine Oberseite sollte frei von Staub, Fingerabdrücken und andere Verschmutzungen gehalten werden, um Leistungseinbußen zu verhindern. Der Touchscreen reagiert empfindlich auf Regentropfen und extreme Temperaturen (Kondensation).

Zur Reinigung des Touchscreens verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung wischen Sie den Touchscreen mit einem feuchten (nicht nassen!), fusselfreien Tuch ab und trocknen Sie ihn mit einem anderen weichen, fusselfreien Tuch.

Den Akku laden

Die Akkulaufzeit Ihres Geräts hängt davon ab, wie Sie das Gerät benutzen. Die Ladedauer hängt davon ab, wie weit das Gerät zu Beginn des Aufladens entleert war. Wenn das Gerät geladen werden muss, suchen Sie die Ladebuchse auf der Unterseite des Geräts und schließen Sie das Ladegerät an.

Die aktuelle Ladestand des Akkus wird Ihnen permanent in der Statuszeile der Software (NuVoice / Empower) des Accents angezeigt.

Stark und ganz entladenen Akku laden

Einen stark entladenen Akku zu laden dauert ca. 10 Stunden. Die Ladezeit verlängert sich um weitere 2 Stunden, sollte der Akku komplett leer sein. Ein weniger stark entladener Akku wird entsprechend schneller aufgeladen.

Regelmäßiges Aufladen

Bei normaler täglicher Benutzung sollte das Gerät täglich – z.B. über Nacht – aufgeladen werden. Weiterhin sollten Sie das Gerät aufladen, wenn die Ladekontrollleuchte blinkt oder leuchtet oder die Akkustandanzeige nur noch rote Balken anzeigt. Können Sie das Gerät nicht aufladen, schalten Sie es in Phasen der Nichtbenutzung aus, um Energie zu sparen.

Ladegerät anschließen



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil zum Laden des Akkus. Andere Netzteile können das Gerät beschädigen.



Verwahren Sie das Gerät beim Laden an einem sicheren Ort.

1. Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an.
2. Stecken Sie den runden Stecker des Ladegeräts in die Ladebuchse.



Sie können das Gerät während des Ladens benutzen.

Die Akku-/Lade-Anzeige

Bei eingeschaltetem Gerät:

- Akku-/Lade-Anzeige ist aus: Akku hat noch ausreichend Kapazität
- Akku-/Lade-Anzeige blinkt: Akku hat weniger als 15% Kapazität (ca. 3 Stunden)

Bei geschlossenem Ladegerät:

- Akku-/Lade-Anzeige leuchtet gelb: Akku wird geladen
- Akku-/Lade-Anzeige leuchtet grün: Akku ist vollständig geladen

Entsorgung des Geräts und/oder des Akkus



Entsorgung des Geräts: Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für gebrauchte elektronische Produkte, über das die richtige Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung gemäß der bestehenden Gesetzgebung gewährleistet wird. Privathaushalte in den Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen können ihre gebrauchten elektronischen Produkte an vorgesehenen Sammeleinrichtungen kostenfrei abgeben oder aber an den Händler zurückgeben, von dem sie es erworben haben.



Entsorgung des Akkus: Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für Altbatterien und abgelaufene Akkus. Privathaushalte in den Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen können Altbatterien und abgelaufene Akkus an Sammelstellen im Handel oder an Wertstoffhöfe kostenfrei abgeben oder aber an den Händler zurückgeben, von dem sie es erworben haben.

Aufstellbügel verwenden und demontieren

Der an der Geräteunterseite eingebaute Bügel ermöglicht die Nutzung des Accent auf ebenen Oberflächen in einem Winkel von 45° oder 60°.

Zur Benutzung des Aufstellbügels klappen Sie den Bügel mit beiden Händen vom Gerät weg, bis er einrastet. Es gibt 2 Einrastpositionen (45° und 60°).



Wollen Sie den Bügel wieder einklappen, drehen Sie das Gerät um, legen Sie es flach auf den Tisch und drücken Sie den Bügel mit beiden Händen Richtung Gerät.

Aufstellbügel demontieren

1. Drehen Sie das Gerät um und legen Sie es flach auf den Tisch.
2. Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen der Bügel gesichert ist, und entnehmen Sie die Bügelsicherungen.
3. Drücken Sie die Schenkel des Bügels leicht nach außen und entnehmen Sie den Bügel.



4. Verwahren Sie Bügel, Bügelsicherungen und Schrauben an einem sicheren Ort.



Kleinteile wie Schrauben, Adapter, Gurte, Ösen und Kabel nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen, es besteht Verschluckungs- und Erstickengefahr!



Wenn Sie den ausklappbaren Ständer demontieren, verwahren Sie ihn an einem sicheren Ort. Beim Hantieren mit dem Ständer besteht die Gefahr von Augenverletzungen!

5. Alternativ befestigen Sie die Bügelsicherungen wieder mit den Schrauben. Fall Sie den Aufstellbügel wieder montieren, achten Sie darauf, dass Sie die Bügelsicherungen wieder einsetzen. Sie verhindern, dass der Aufstellbügel versehentlich herausgenommen werden kann.

Griff demontieren und Portabdeckung montieren

Falls Sie den oben angebrachten Tragegriff nicht benötigen, können Sie ihn demonstrieren. Wenn Sie keine Kopfmaus NuPoint montieren, müssen Sie die Portabdeckung montieren.

1. Drehen Sie das Gerät um und legen Sie es flach auf den Tisch.
2. Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen der Griff befestigt ist.
3. Ziehen Sie den Griff ab und verwahren Sie ihn an einem sicheren Ort.



4. Nehmen Sie die mitgelieferte Portabdeckung und setzen Sie sie ein.



5. Befestigen Sie die Portabdeckung mit den beiden Schrauben.

Um den Griff zu montieren:

Drehen Sie das Gerät um und legen Sie es flach auf den Tisch. Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen Kopfmaus bzw. Portcover befestigt ist. Nehmen Sie Kopfmaus bzw. Portabdeckung ab und verwahren Sie sie an einem sicheren Ort. Setzen Sie den Griff ein. Der geeignete Teil zeigt Richtung Display. Befestigen Sie den Griff mit den beiden Schrauben.

Um die Portabdeckung zu demontieren:

Drehen Sie das Gerät um und legen Sie es flach auf den Tisch. Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Portabdeckung befestigt ist. Nehmen Sie die Portabdeckung ab und verwahren Sie sie an einem sicheren Ort. Befestigen Sie anschließend den Griff oder die Kopfmaus NuPoint.



Kleinteile wie Schrauben, Adapter, Gurte, Ösen und Kabel nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen, es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

Displayschutzfolie montieren

Eine Displayschutzfolie ist eine transparente Folie, die auf das Display geklebt wird und es vor Schmutz und Kratzern schützt. Das Gerät kann mit der Folie ganz normal genutzt werden. Ein Satz enthält 6 Schutzfolien, 3 sind glänzend und 3 (zu erkennen am roten Punkt) sind matt.

Die Displayschutzfolie muss direkt auf dem Display angebracht werden. Falls Sie einen Rahmen verwenden, demontieren Sie ihn, bevor Sie die Displayschutzfolie anbringen (siehe Seite 22).

1. Schalten Sie den Accent 1000 aus und legen Sie ihn flach auf den Tisch.
2. Entfernen Sie Staub und Fingerabdrücke vom Display, indem Sie es mit einem fusselfreien Lappen mit etwas Wasser oder mit einem für Flachbildschirme zugelassenen Reiniger abwischen.
3. Nehmen Sie nun die Displayschutzfolie (zunächst noch mit Schutzfolie) und legen diese auf das Display. Suchen Sie die richtige Position.
4. Wenn Sie sicher sind, dass Sie die richtige Position gefunden haben, kann die Schutzfolie, die die klebrige Seite der Displayschutzfolie schützt, vorsichtig ein kleines Stück weit abgezogen werden. Beginnen Sie das Anbringen der Displayschutzfolie an der kurzen Seite des Displays.
5. Ziehen Sie langsam immer mehr der Schutzfolie ab. Achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung der Displayschutzfolie zum Display. Drücken Sie mit der anderen Hand die Displayschutzfolie vorsichtig auf das Display. Indem die Displayschutzfolie vorsichtig auf dem Display abgerollt wird, kann sich kein Staub auf der klebrigen Seite der Folie festsetzen.
6. Wenn das Ende des Displays erreicht ist, sollte die Displayschutzfolie korrekt anliegen.
7. Falls sich Luftblasen gebildet haben, schieben Sie diese vorsichtig mit der mit der Displayschutzfolie normalerweise mitgelieferten Anbringungskarte nach unten aus dem Display heraus. Haben Sie keine Anbringungskarte erhalten, können Sie auch eine EC- oder Kreditkarte oder eine Visitenkarte benutzen.



8. Haben sich sehr viele Blasen gebildet oder ist Staub unter die Displayschutzfolie gelangt, so wiederholen Sie den Prozess. Ziehen Sie die Displayschutzfolie wieder ab. Achten Sie darauf, das Material nicht zu überdehnen. Sollten Sie die Folie nicht noch einmal verwenden können, nehmen Sie eine andere (Displayschutzfolien kommen in der Regel in Paketen mit mehreren Folien).
9. Entfernen Sie Staub und Fingerabdrücke von der Displayschutzfolie, indem Sie sie mit einem fusselfreien Lappen mit etwas Wasser oder mit einem für Flachbildschirme zugelassenen Reiniger abwischen.

Rahmen demontieren

Der Accent 1000 wird geliefert mit einem auf dem Gerät montierten schwarzen Rahmen. Der Rahmen wird benötigt zur Befestigung von Fingerführungsgittern (Keyguards) und Fingerführungshilfen (Touchguides). Wenn Sie keinen Rahmen benötigen, können Sie ihn demontieren.

1. Haben Sie ein Abdeck- oder Fingerführungsgitter montiert, so entfernen Sie dieses zunächst.
2. Entfernen Sie die 6 Schrauben, mit denen der Rahmen auf der Unterseite verschraubt ist. 4 größere Schrauben sitzen links und rechts an der Seite, 2 kleinere sitzen im Griff bzw. in der Portabdeckung bzw. in der Kopfmaus
3. Ziehen Sie den Rahmen an den Seiten vom Gerät weg nach oben.



4. Ziehen Sie die beiden Zapfen oben am Rahmen aus den Aussparungen zwischen Griff und Gehäuse nach oben heraus.
5. Ziehen Sie den Rahmen unten über das Gehäuse und nehmen Sie ihn ab.



6. Verwahren Sie Rahmen und Schrauben sorgfältig.



Kleinteile wie Schrauben, Adapter, Gurte, Ösen und Kabel nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen, es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

Rahmen montieren

Zur Befestigung von Fingerführungsgittern (Keyguards) und Fingerführungshilfen (Touchguides) müssen Sie den mitgelieferten Rahmen montieren.

1. Befestigen Sie zunächst die linke und rechte Seite des Rahmens, indem Sie sie zunächst eine und dann die andere Seite über das Gehäuse schnappen lassen.
2. Ziehen Sie den Rahmen oben über das Gehäuse, so dass die beiden Zapfen oben am Rahmen in die Aussparungen zwischen Griff und Gehäuse rutschen.



3. Ziehen Sie den Rahmen unten über das Gehäuse, bis der Zapfen hinter das Gehäuse rutscht.
4. Zur Verbesserung der Befestigungsstärke können Sie den Rahmen verschrauben.



Der Rahmen ist nun montiert. Bei einer Verwendung rein als farbgebendes Element ist keine weitere Befestigung nötig.

Falls Sie ein Fingerführungsgitter oder eine Fingerführungshilfe montieren wollen, können Sie die Rahmen verschrauben.



Kleinteile wie Schrauben, Adapter, Gurte, Ösen und Kabel nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen, es besteht Verschluckungs- und Erstickengefahr!



Beim Hantieren mit dem Rahmen besteht die Gefahr von Augenverletzungen!

Rahmen verschrauben Wenn Sie den Rahmen dauerhaft benötigen und nicht hin und wieder entfernen wollen, können Sie ihn mit dem Accent 1000 verschrauben. Der Rahmen verbleibt auch dann noch auf dem Gerät, wenn der Benutzer z. B. hart am Fingerführungsgitter reißt.



Verschrauben Sie den Rahmen mit den 2 kleineren Schrauben oben durch die kleinen Öffnungen im Griff bzw. in der Portabdeckung bzw. in der Kopfmaus mit dem Gehäuse.

Verschrauben Sie den Rahmen mit den 4 größeren Schrauben links und rechts mit dem Gehäuse.

Nach Montage des Rahmens können Sie ein Fingerführungsgitter oder ein Fingerführungsgitter montieren.



Kleinteile wie Schrauben, Adapter, Gurte, Ösen und Kabel nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen, es besteht Verschluckungs- und Erstickenungsgefahr!



Beim Hantieren mit dem Rahmen besteht die Gefahr von Augenverletzungen!

Fingerführungsgitter montieren

Zur Befestigung eines Fingerführungsgitters muss der Rahmen am Accent 1000 befestigt sein (siehe Seite 23).

Richten Sie das Fingerführungsgitter aus. Oben ragen 2 Stifte links und rechts aus dem Fingerführungsgitter heraus, unten ist eine halbkreisförmige Aussparung. Die seitlichen Stege zum Einrasten müssen unten (dem Display zugewandt) sein.

1. Schieben Sie eine der Stifte in die Aussparung im Rahmen.




2. Biegen Sie das Fingerführungsgitter und schieben Sie den andern Stift in die gegenüberliegende Aussparung.



3. Drücken Sie das Fingerführungsgitter unten an (außen links und rechts), bis Sie das Klicken der einrastenden Stege hören.



 Falls das Fingerführungsgitter nicht einrastet, haben Sie es vermutlich falsch herum montiert und die Stege sind oben.



Beim Hantieren mit dem Gitter besteht die Gefahr von Augenverletzungen!

Fingerführungsgitter hochklappen

Zur Reinigung des Displays oder um in der Toolbox Eingaben vorzunehmen, können Sie das Fingerführungsgitter hochklappen.

1. Halten Sie das Gerät mit einer Hand am Gehäuse fest.
2. Fassen Sie mit einem Finger der anderen Hand unter die halbkreisförmige Aussparung unten in der Mitte des Fingerführungsgitters und klappen Sie es nach oben.



3. Das Fingerführungsgitter verbleibt in der oberen Position, bis Sie es wieder herunterklappen.
4. Drücken Sie das Fingerführungsgitter unten (außen links und rechts) an, bis die Stege einrasten.

Fingerführungsgitter demontieren

Zum Entfernen des Fingerführungsgitters vom Gerät gehen Sie so vor.

1. Halten Sie das Gerät mit einer Hand am Gehäuse fest.
2. Fassen Sie mit einem Finger der anderen Hand unter die halbkreisförmige Aussparung unten in der Mitte des Fingerführungsgitters und ziehen Sie es etwas nach oben, so dass die Stege unten nicht mehr eingerastet sind, die das Fingerführungsgitter unten im Rahmen fixieren.



3. Greifen Sie das Fingerführungsgitter oben in der Mitte und biegen Sie es nach oben (vom Display weg).
4. Ziehen Sie die beiden Stifte links und rechts oben am Fingerführungsgitter aus dem Rahmen.



Beim Hantieren mit dem Gitter besteht die Gefahr von Augenverletzungen!

Fingerführungshilfe montieren

Zur Befestigung einer Fingerführungshilfe muss der Rahmen am Accent 1000 befestigt sein (siehe Seite 23).

1. Richten Sie die Fingerführungshilfe aus: in einer Ecke sind zwei kleine quadratische Öffnungen, diese gehört nach rechts oben.



2. Schieben Sie die beiden unteren Zungen in die Aussparungen unten im Rahmen.




3. Biegen Sie die Fingerführungshilfe leicht horizontal und schieben Sie die beiden oberen Zungen nacheinander in die entsprechenden Aussparungen im Rahmen.



Beim Hantieren mit der Fingerführungshilfe besteht die Gefahr von Augenverletzungen!

Fingerführungshilfe demontieren

1. Greifen Sie in eine der breiteren Öffnungen in der zweiten Zeile von oben.
2. Biegen Sie die Fingerführungshilfe horizontal, in den Sie die Finger nach unten ziehen, bis die oberen Zungen aus den Aussparungen am Rahmen heraus-schauen.

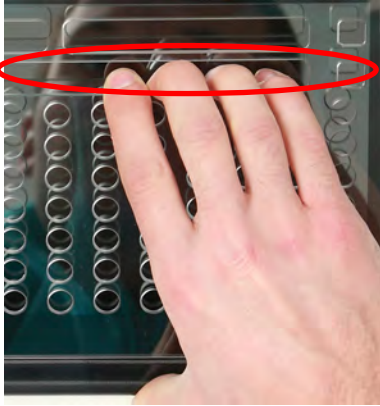

3. Nehmen Sie die Fingerführungshilfe heraus.



Beim Hantieren mit der Fingerführungshilfe besteht die Gefahr von Augenverletzungen!

Tragegurt befestigen

An den Accent 1000 kann ein Tragegurt (Schultergurt) befestigt werden. Dazu dienen je zwei Ösen oben und unten in der Unterseite des Geräts. Im Lieferumfang des Geräts enthalten sind zwei Clips zur Befestigung des Tragegurts.

1. Fädeln Sie die Clips durch die beiden unteren oder oberen Ösen, je nachdem, wie der Accent 1000 getragen werden soll.
2. Ziehen Sie den Clipverschluss durch die Schlaufe.



3. Ziehen Sie die Schlaufe stramm.



4. Verbinden Sie den Clip mit der Schnalle.



5. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Clip.



Kleinteile wie Schrauben, Adapter, Gurte, Ösen und Kabel nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen, es besteht Verschluckungs- und Erstickenungsgefahr!

Befestigungsplatte für Halterungssysteme montieren

Für die des Accent 1000 an einem Halterungssystem (Rollstuhl-, Tisch- oder Bett-halterung) dient die optional erhältliche Befestigungsplatte, die auf der Geräteunter-seite montiert wird. Dazu stehen 3 Gewindebuchsen zur Verfügung.

1. Entfernen Sie die 3 Schrauben in der Unterseite des Accent 1000.
2. Legen Sie die Befestigungsplatte auf das Gerät.



3. Achten Sie darauf, dass das Loch für den Pinlock links oben ist:
4. Befestigen Sie die Platte mit den 3 Schrauben.



Prüfen Sie die Schrauben regelmäßig auf festen Sitz!

Befestigungsplatte demontieren

1. Entfernen Sie die 3 Schrauben.
2. Nehmen Sie Befestigungsplatte ab.
3. Setzen Sie die Schrauben wieder ein.
4. Verwahren Sie die Platte an einem sicheren Ort.




Kleinteile wie Schrauben, Adapter, Gurte, Ösen und Kabel nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen, es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

Eyetracker montieren

Für den Accent 1000 steht optional der Eyetracker Look zur Verfügung. Haben Sie Ihren Accent 1000 mit Eyetracker bestellt, so wird dieser bereits montiert sein. Wollen Sie den Eyetracker Look nachrüsten, so folgen Sie diesen Anweisungen zur Montage des Eyetrackers.

Montage am Accent 1000-30 (Seriennummer ab 10000)

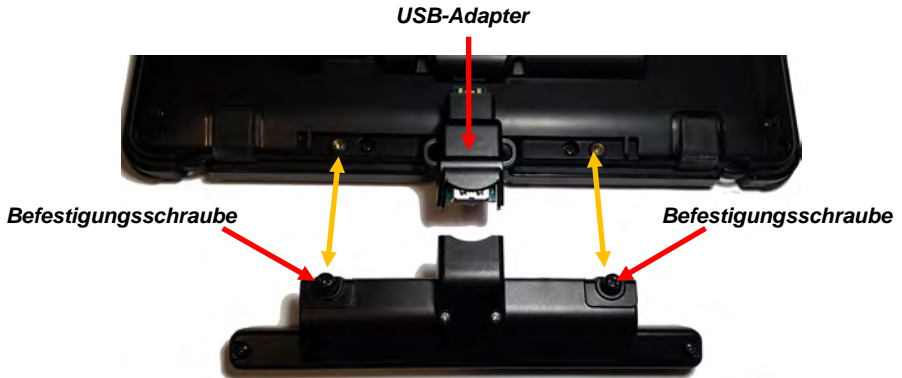

1. Stecken Sie den USB-Adapter in die USB-Buchse unten auf der Rückseite des Accents 1000-30.
2. Schließen Sie die Look-Augensteuerung an den USB-Adapter an.
3. Befestigen Sie die Look-Augensteuerung mit den beiden Schrauben am Accent 1000-30.
4. Stellen Sie sicher, dass die Look-Augensteuerung bündig auf dem Accent 1000 aufliegt.



Falsche Montage:

Auf dem Foto links ist eine Lücke zwischen Look und dem Gehäuse des Accents sichtbar.

Lösen Sie die Schrauben wieder, legen Sie das Look-Modul bündig auf den Accent und befestigen Sie die Schrauben erneut.



Prüfen Sie die Schrauben regelmäßig auf festen Sitz!

Kopfmaus NuPoint montieren

Für den Accent 1000 steht optional die interne Kopfmaus NuPoint zur Verfügung. Haben Sie Ihren Accent 1000 mit Kopfmaus bestellt, so wird diese bereits montiert sein. Wollen Sie die Kopfmaus nachrüsten, so folgen Sie diesen Anweisungen zur Montage der Kopfmaus.

1. Drehen Sie den Accent 1000 um und legen Sie ihn flach auf den Tisch.
2. Haben Sie einen Rahmen montiert und dieser ist verschraubt, so entfernen Sie die beiden kleinen Schrauben oben im Bereich des Griffs bzw. der Portabdeckung. Verwahren Sie die Schrauben an einem sicheren Ort.
3. Entfernen Sie den Griff bzw. die Portabdeckung (siehe Seite 20). Sie benötigen Sie dabei erhaltenen Schrauben zur Befestigung der Kopfmaus.
4. Richten Sie die Kopfmaus so aus, dass die beiden Schraubenlöcher in der Kopfmaus über den Gewindebuchsen des Accents liegen und der Mini-USB-Anschluss in der Mitte der Kopfmaus über der zugehörigen Buchse des Accents liegt.



5. Schieben Sie die Kopfmaus in den Accent hinein. Versichern Sie sich, dass der USB-Stecker der Kopfmaus in der USB-Buchse des Accents steckt.
6. Befestigen Sie die Kopfmaus mit den beiden Schrauben.
7. Die Kopfmaus ist bereit zur Benutzung.



Zur Nutzung der Kopfmaus NuPoint beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihrer Kommunikationssoftware (NuVoice bzw. Empower).



Kleinteile wie Schrauben, Adapter, Gurte, Ösen und Kabel nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen, es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

HDMI-Ausgang verwenden

Sie können Ihren Accent 1000 mit einem HDMI-Kabel zwecks Bild- und Tonwiedergabe mit einem externen Monitor, einem TV-Gerät oder einem Projektor verbinden. Dabei haben Sie die Wahl, ob

- nur das externe Anzeigegerät die Bildschirmanzeige übernimmt,
- das externe Anzeigegerät und der Accent 1000 das gleiche Bild anzeigen,
- das externe Anzeigegerät einen erweiterten Bildschirm abzeigt.


Sie benötigen ein HDMI-Kabel mit HDMI A-Stecker auf HDMI D-Stecker (Micro). Schließen Sie den kleinen Stecker des HDMI-Kabels an die Buchse auf der rechten Seite des Accent 1000 an. Schließen Sie den großen Stecker des HDMI-Kabels an Ihr externes Anzeigegerät an.

Audiowiedergabe auf Accent umstellen

Auch die Audiowiedergabe erfolgt bei angeschlossenem HDMI-Kabel über das externe Anzeigegerät. Sollte Ihr externes Anzeigegeräte keine Audiowiedergabe ermöglichen, stellen Sie die Audiowiedergabe manuell auf die im Accent 1000 eingebauten Lautsprecher um.

- Minimieren Sie die Kommunikationssoftware NuVoice bzw. Empower, um den Windows-Desktop anzuzeigen.



- Tippen Sie auf das Windows-Symbol
- Wählen Sie **Einstellungen** .
- Wählen Sie **System**.
- Wählen Sie **Sound**.
- Wählen Sie bei **Ausgabegerät auswählen** die Option „Speakers (USB Audio Device)“
- Tippen Sie auf das NuVoice- bzw. Empower-Symbol in der Taskleiste, um zu dieser Anwendung zurückzukehren.

Anzeigegerät und -art wählen



Wenn Sie das externe Anzeigegerät das erste Mal an den Accent 1000 anschließen, erfolgt die Anzeige ausschließlich über das externe Anzeigegerät. Das Display im Accent 1000 wird abgeschaltet.


Sie können wählen, ob

- die Inhalte des Accents nur auf dem Accent sichtbar sein sollen (Nur „PC-Bildschirm“),
- das externe Anzeigegerät und der Accent 1000 das gleiche Bild anzeigen („Duplizieren“),
- das externe Anzeigegerät einen anderen (erweiterten) Bildschirm anzeigt („Erweitern“),
- nur das externe Anzeigegerät die Bildschirmanzeige übernimmt (Nur „PC-Bildschirm“),

Wollen Sie die Accent-Bildschirmausgabe auf dem externen Anzeigegerät sichtbar machen, wählen Sie „Duplizieren“.

Wollen Sie z. B. eine Präsentation vorführen, wählen Sie „Erweitert“ und lassen Sie das Präsentationsprogramm im erweiterten Desktop anzeigen.

- Minimieren Sie die Kommunikationssoftware NuVoice bzw. Empower, um den Windows-Desktop anzuzeigen.
- Tippen Sie auf das Info-Center  in der Taskleiste.
- Wählen Sie Projizieren .
- Wählen Sie, was auf dem externen Bildschirm angezeigt werden soll:

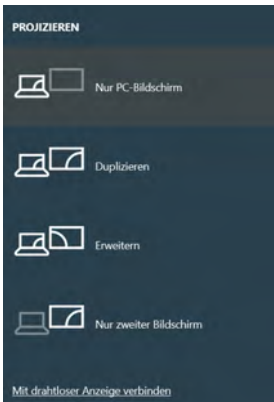

- Tippen Sie auf das NuVoice- bzw. Empower-Symbol in der Taskleiste, um zu dieser Anwendung zurückzukehren.

Computersteuerung

Kabelgebundene Computersteuerung

Der Accent 1000 verfügt über eine Mini-USB-Buchse, über die die Steuerung eines externen Computers möglich ist.

- Verbinden Sie den Accent 1000 mit einem USB-Kabel mit dem Computer.
- Drücken Sie die Taste TOOLS.
- Öffnen Sie die Toolbox.
- Öffnen Sie das Menü AUSGABE
- Stellen Sie die Option „Ausgabe“ auf „Ein“.
- Stellen Sie die Option „Ausgabe über“ auf „USB“.
- Stellen Sie die Option „Tastaturlayout“ auf „deutsch“.

Für weitere Optionen zur Steuerung eines externen Computers schlagen Sie bitte im NuVoice-Software-Manual nach.

Drahtlose Computersteuerung

Der Accent 1000 verfügt über eine Bluetooth-Schnittstelle, über die er mit kompatibelem Zubehör verbunden werden kann.

Sie benötigen den PRC-Bluetooth-Adapter, um drahtlos einen externen PC steuern zu können.



- Stecken Sie den PRC-Bluetooth-Adapter in eine freie USB-Schnittstelle des zu steuernden Computers.
- Drücken Sie die Taste TOOLS.
- Öffnen Sie die Toolbox.
- Öffnen Sie das Menü AUSGABE
- Stellen Sie die Option „Ausgabe“ auf „Ein“.
- Stellen Sie die Option „Ausgabe über“ auf „Bluetooth“.
- Stellen Sie die Option „Tastaturlayout“ auf „deutsch“.
- Sie müssen einmalig den PRC-Bluetooth-Adapter mit dem Accent 1000 koppeln. Wählen Sie dazu „mit Bluetooth-Adapter koppeln“ auf dem Accent 1000.
- Drücken Sie die kleine Taste am PRC-Bluetooth-Adapter
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Sind PRC-Bluetooth-Adapter und Accent 1000 gekoppelt, finden Sie sich zukünftig automatisch, und verbinden sich automatisch.



Kleinteile wie Schrauben, Adapter, Gurte, Ösen und Kabel nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen lassen, es besteht Verschluckungs- und Erstickengefahr!



Für weitere Optionen zur Steuerung eines externen Computers schlagen Sie bitte im NuVoice-Software-Manual nach.

Drahtlose Internetverbindung einrichten

Der Accent 1000 verfügt über eine WLAN-Schnittstelle, über die er mit dem Internet verbunden werden kann.

Sie benötigen eine Internetverbindung, um


- Software-Updates für den Accent 1000 herunterzuladen;
- Windows-Updates durchzuführen.

Haben Sie ein offenes System, können Sie die WLAN-Schnittstelle weiterhin nutzen, um mit dem Accent 1000 direkt auf das Internet zuzugreifen.

Bitte beachten Sie:




- PRD und PRC sind nicht verantwortlich für das Zur-Verfügung-Stellen einer Internetverbindung.
- Die Nutzung eines WLANs erfolgt auf eigene Gefahr.
- Durch die Nutzung des Internets können Kosten entstehen.


1. Schalten Sie den Accent 1000 ein.
2. Drücken Sie die Taste **TOOLS** und öffnen Sie die **Toolbox**.
3. Öffnen Sie das Menü **SYSTEM** und wählen Sie **Hardware-Diagnostik**.
4. Wählen Sie den Eintrag **Netzwerkeinstellungen**.
5. Das **Netzwerk- und Freigabecenter** wird geöffnet. Schließen Sie dieses Fenster.
6. Tippen Sie auf das WLAN-Symbol oben in der Statusleiste . Verfügbare Drahtlosnetzwerke werden angezeigt:




7. Tippen Sie auf das gewünschte WLAN und anschließend auf **Verbinden**:

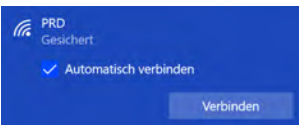


8. Öffnen Sie die Bildschirmtastatur  und geben Sie den Netzwerksicherheitsschlüssel ein:

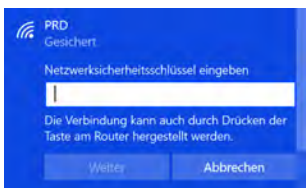

9. Tippen Sie auf **Weiter**:

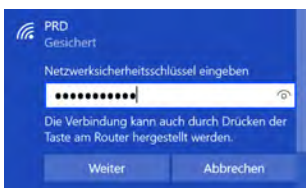

10. Der Accent 1000 verbindet sich mit dem Netzwerk.

11. Tippen Sie auf das NuVoice-Symbol  oben in der Statusleiste, um wieder zur Anwendung zurückzukehren.

Windows-Energiemanagement

Der Accent 1000 verwendet das Betriebssystem Windows 10.

Zur Nutzung der Energiesparoptionen schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung der von Ihnen verwendeten Kommunikationssoftware (NuVoice bzw. Empower) nach.

Windows herunterfahren

Diese Funktion fährt den Accent 1000 komplett herunter. Das Herunterfahren dauert ca. 30 Sekunden. Der Accent 1000 kann anschließend nur durch Drücken der I/O-Taste wieder eingeschaltet werden.

Windows-Neustart

Diese Funktion fährt den Accent 1000 herunter und startet Windows neu. Ein Neustart dauert ca. 1-2 Minuten.

Belegung der I/O-Taste

Wählen Sie, was der Accent machen soll, wenn die Ein/Aus-Taste betätigt wird. Mögliche Werte sind

- **Deaktiviert:** die Taste hat keine Funktion
- **Standby-Modus** [Standardwert]: der Accent 1000 geht in den Standby-Modus. Tippen Sie kurz auf die Taste TOOLS oder die Ein/Aus-Taste, um ihn wieder aufzuwecken
- **Ruhezustand** (nur NuVoice): der Accent 1000 geht in den Ruhezustand. Tippen Sie kurz auf die Ein/Aus-Taste, um ihn wieder aufzuwecken
- **Herunterfahren:** der Accent 1000 wird heruntergefahren. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um ihn neu zu starten.

Display ausschalten nach (nur NuVoice)

Wählen Sie, wann die Beleuchtung des Displays heruntergeregelt wird, sofern keine Eingaben mehr vorgenommen werden. Mögliche Werte sind Aus, 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten und 30 Minuten.

Standby nach (nur Empower)

Wählen Sie, wann der Accent 1000 in den Standby-Modus geht, sofern keine Eingaben mehr vorgenommen werden.

Bildschirmhelligkeit (nur Empower)

Wählen Sie die Stärke der Hintergrundbeleuchtung des Displays. Je heller das Display leuchtet, umso mehr Strom verbraucht es.

Den Accent 1000 benutzen

Zur Nutzung des Accent 1000 (Auswahl eines Vokabulars, Wahl der Ansteuerung sowie das Anpassen dieser an die individuellen Bedürfnisse) schlagen Sie bitte im Handbuch zu der von Ihnen verwendeten Kommunikationssoftware NuVoice oder Empower nach.

.

Transportschutzmodus aktivieren bei längerer Nichtbenutzung des Geräts



Wenn Sie ihr Gerät für einen längeren Zeitraum nicht nutzen werden, gehen Sie so vor

1. Laden Sie den Akku vollständig.
2. Lassen Sie das Netzteil angeschlossen.
3. Öffnen Sie das Menü SYSTEM.
4. Wählen Sie das Menü Akku.
5. Wählen Sie die Option „Transportschutz aktivieren“.
6. Bestätigen Sie die Abfrage mit „Ja“.
7. Schließen Sie die Menüs.
8. Ziehen Sie das Netzteil ab.

Lagern Sie ihr Gerät an einem trockenen, nicht zu warmen und nicht zu kalten Ort.

Gerät benutzen aus dem Transportschutzmodus

Wollen Sie ihr Gerät aus dem Transportschutzmodus wieder benutzen, gehen Sie so vor:

1. Schließen Sie das Netzteil an.
2. Drücken und Halten Sie die I/O-Taste.
3. Das Gerät bootet.
4. Lassen Sie das Netzteil angeschlossen, bis der Akku vollständig geladen ist.

Reinigung & Desinfektion

Wird das Gerät nur von einer Person benutzt, sollte es regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden.



Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Ladegerät ab, bevor Sie das Gerät reinigen oder desinfizieren.

Reinigung des Geräts



Achtung: Verwenden Sie keine Lösemittel, Scheuermittel, Spritzwasser oder Reiniger auf dem Bildschirm oder dem Gehäuse.

Reinigung des Gehäuses

Zur Reinigung des Accents wischen Sie ihn bitte mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch ab. Vor dem Wiedereinschalten ist das Gerät gründlich zu trocknen.

Reinigung des Touchscreens

Der Touchscreen ist sehr berührungsempfindlich. Seine Oberseite sollte frei von Staub, Fingerabdrücken und andere Verschmutzungen gehalten werden, um Leistungseinbußen zu verhindern. Der Touchscreen reagiert empfindlich auf Regentropfen und extreme Temperaturen (Kondensation). Zur Reinigung des Touchscreens verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung wischen Sie den Touchscreen mit einem feuchten (nicht nassen!), fusselfreien Tuch ab und trocknen Sie ihn mit einem anderen weichen, fusselfreien Tuch.

Reinigung des Abdeckgitters und der Fingerführungshilfe

Nehmen Sie das Abdeckgitter bzw. die Fingerführungshilfe vom Gerät ab. Spülen Sie es in warmem Wasser mit Spülmittel ab. Vor dem Wiedereinsetzen ist das Abdeckgitter / die Fingerführungshilfe gründlich zu trocknen.

Desinfektion des Geräts

Zum Desinfizieren des Geräts außer dem Display mischen Sie eine Viertel Tasse Essig mit einer Tasse Wasser. Befeuchten Sie ein Tuch mit der Essiglösung. Entfernen Sie Rahmen und Abdeckgitter bzw. Fingerführungshilfe. Wischen Sie das Gehäuse (aber nicht das Display!) mit dem Tuch ab. Waschen Sie Rahmen, Abdeckgitter und Fingerführungshilfe separat mit der Essiglösung. Lassen Sie alles gründlich trocknen.



Das Display niemals mit Essiglösung oder essighaltigen Reinigern reinigen!

Entfernen von Speichel

Speichel, der auf das Display tropft, sollte möglichst umgehend mit einem fusselfreien Lappen abgewischt werden.

Entfernen von Flüssigkeit

Wurde Flüssigkeit auf das Gerät geschüttet oder das Gerät ist in einem Regenguss nass geworden, schalten Sie es umgehend aus und trocknen Sie es gründlich. Schalten Sie das Gerät nach dem Trocken wieder ein. Sollte es nicht starten, wenden Sie sich an den technischen Service von PRD.

Reinigung des EyeTrackers



Niemals den Eyetracker in Wasser eintauchen!



Benutzen Sie niemals Scheuermittel, scharfe Reiniger oder kratzende, scheuernde Reinigungsgeräte. Eine Beschädigung der lichtdurchlässigen Oberseite des Eyetrackers könnte die Folge sein!

Zur Reinigung des Look-Moduls nehmen Sie ein Mikrofasertuch und wischen Sie die Oberfläche des Look-Moduls damit ab. Verwenden Sie keine anderen Tücher, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

Sollte das Look-Modul stark verschmutzt sein, feuchten Sie ein Mikrofasertuch leicht an. Das Tuch darf nur leicht feucht, nicht aber tropfend nass sein. Wischen Sie die Oberfläche des Look-Moduls mit dem feuchten Tuch ab. Reiben Sie anschließend das Look-Modul mit einem fusselfreien Tuch vorsichtig trocken.

Ist die lichtdurchlässige Oberseite des Look-Moduls verschmiert oder verschmutzt, feuchten Sie ein Mikrofasertuch oder ein fusselfreies Tuch leicht an (das Tuch darf nur leicht feucht, nicht aber tropfend nass sein) und reinigen Sie damit vorsichtig die Oberfläche des Look-Moduls. Trocknen und polieren Sie die Oberfläche anschließend mit einem Mikrofasertuch oder einem fusselfreien Tuch

Führen Sie am besten immer ein Mikrofasertuch mit sich und reinigen Sie die Oberseite des Look-Moduls täglich.

Hygienische Wiederaufarbeitung des Geräts und/oder des Zubehörs



Den hier gemachten Angaben zur hygienischen Wiederaufarbeitung von Geräten und Zubehör ist stets zu folgen, wenn ein und dasselbe Gerät bzw. Zubehör von mehreren Patienten verwendet werden soll. In solch einem Fall ist es unerlässlich, das Hilfsmittel und das verwendete Zubehör effektiv zu desinfizieren, bevor es an einen anderen Patienten ausgehändigt wird.

1. Ziehen Sie Einmalhandschuhe an.
2. Demontieren Sie Zubehör wie Fingerführungsgitter und Fingerführungshilfen (Keyguards und Touchguides) sowie den zugehörigen Rahmen.
3. Reinigen Sie Gerät und Zubehör
 - 3.1 Wischen Sie Gerät und Zubehör mit einem Desinfektionstuch (viruzid, bakterizid, pseudomonizid, tuberkulozid, fungizid) ab, z. B. Metrex CaviWipes. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers des Desinfektionstuchs für die Reinigung.
 - 3.2 Befeuchten Sie ein Wattestäbchen mit einem Glasreiniger und reinigen Sie alle Zwischenräume der Kommunikationshilfe. Benutzen Sie ggf. eine Bürste (z.B. eine Zahnbürste), um in Zwischenräumen und Spalten zu reinigen.
 - 3.3 Trocknen Sie das Gerät mit einem Fön oder wischen Sie es trocken.

Wichtig! Stellen Sie sicher, dass aller Schmutz vom Gerät und vom Zubehör entfernt wurde, bevor Sie das Equipment desinfizieren.

4. Desinfizieren Sie Gerät und Zubehör
 - 4.1 Wischen Sie Gerät und Zubehör mit einem neuen Desinfektionstuch (viruzid, bakterizid, pseudomonizid, tuberkulozid, fungizid) gründlich ab, z. B. Metrex CaviWipes. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers des Desinfektionstuchs für die Desinfizierung.
 - 4.2 Wischen Sie auch alle Ecken, Kanten und Spalten gründlich.
 - 4.3 Wischen Sie Gerät und Zubehör mindestens drei (3) Minuten lang ab.
 - 4.4 Lassen Sie Gerät und Zubehör trocknen.
5. Reinigung des Touchscreens
 - 5.1 Sobald das Gerät trocken ist, reinigen Sie Display / Touchscreen mit für Displays und Computermonitore geeignetem Glasreiniger. Verwenden Sie keine essighaltigen Reiniger, da diese das Display verfärben könnten.
 - 5.2 Lassen Sie das Gerät trocknen.



Das Gerät niemals in Wasser eintauchen oder in feuchten Räumen betreiben. Vor Feuchtigkeit schützen!



Ist das Gerät mit Feuchtigkeit in Berührung gekommen, schalten Sie es umgehend aus. Lassen Sie das Gerät vor dem Wiedereinschalten komplett trocknen. Feuchtigkeit in den USB-Buchsen können Sie entfernen, indem Sie das Gerät mit dem USB-Buchse nach unten richten und es mehrfach stark schütteln. Trocknen Sie anschließend die USB-Buchse mit reinem Mikrofasertuch. Wiederholen Sie den Vorgang so lange, bis sich keine Feuchtigkeit mehr in der / den USB-Buchse(n) befindet.

Hinweise zum Wiedereinsatz

Das Gerät ist für den Wiedereinsatz geeignet. Im Falle eines Wiedereinsatzes sind durch den Hersteller folgende Maßnahmen durchzuführen:

Das Gerät ist für den Wiedereinsatz geeignet. Im Falle eines Wiedereinsatzes sind durch den Hersteller folgende Maßnahmen durchzuführen:

- Re-Imaging des Accents
- Reinigung des Hilfsmittels
- Hygienische Wiederaufarbeitung des Hilfsmittels
- Durchführen von NuVoice- und Windows-Updates
- Funktionsprüfung
- Inspektion / Wartung gemäß §7 MPBetreibV

FEHLERSUCHE UND PROBLEMBEHEBUNG

Akku-Problembhebung



Es besteht die Gefahr einer Explosion, wenn Sie einen anderen als den vom Hersteller verwendeten und freigegebenen Akku einsetzen.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil zum Laden der in das Gerät eingebauten Akkus.



Wenn der Akku komplett entleert ist

Zeigt die Akkukontrollanzeige in der Statuszeile des Displays nur noch rote und gelbe Balken, erscheint ein Warnhinweis zum Anschluss des Netzteils.

Läuft die Software NuVoice nicht, erscheint die Windows-Meldung zum niedrigen Energiestand und dass das System demnächst heruntergefahren wird.

Schließen Sie umgehend das Netzteil an, um das Herunterfahren zu verhindern.

Um das Gerät nach einem Herunterfahren wieder nutzen zu können, schließen Sie das Netzteil an und drücken Sie die Ein/Aus-Taste kurz, bis die beiden Pieptöne ertönen und das Gerät startet.

Ist der Akku total entladen, laden Sie den Accent 1000 ca. 30 Minuten lang, bevor Sie ihn wieder benutzen.

Sollten Sie vom Betriebssystem die Meldung erhalten „Windows wurde nicht ordnungsgemäß heruntergefahren“ und entsprechende Optionen zum Neustart angeboten bekommen, warten Sie 30 Sekunden oder schließen Sie eine USB-Tastatur an den Accent 1000 an und wählen Sie die Option „Windows normal starten“.

Pannenhilfe

Was mache ich, wenn...

Das Gerät selektiert falsche Tastenfelder

Reinigen Sie das Display vorsichtig mit einem milden Reiniger wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ auf S. 41 beschrieben.

Die Umfeldkontrolle funktioniert nicht

Prüfen Sie, ob Gegenstände zwischen dem Accent und dem zu steuernden Gerät den Empfang der Infrarotsignale behindern.

Der Accent strahlt die Infrarotsignale nach oben ab. Wählen Sie einen anderen Winkel zum zu steuernden Gerät.

Sollten Sie sich unter starken Leuchtstoffröhren aufhalten, besteht die Möglichkeit, dass die vom Gerät ausgesendeten IR-Signale durch die von Leuchtstofflampen ausgehenden elektromagnetischen Wellen gestört werden. Schalten Sie die Leuchtstofflampen aus oder wechseln Sie den Platz, um die Umfeldkontrolle wieder nutzen zu können.

Der Accent spricht nicht, obwohl die Sprachausgabe aktiviert ist

Setzen Sie das Verstärkermodul zurück (siehe Seite 15).

Der Accent reagiert nicht mehr auf Eingaben und lässt sich auch nicht ausschalten

Setzen Sie den Accent zurück über das erzwungene Ausschalten (siehe Seite 14).



Windows-Fehlersuche


Haben Sie Probleme bei der Ausführung der NuVoice-Anwendung oder von Windows-Programmen, führen Sie wie unten beschrieben einen Windows-Neustart durch.

DRÜCKEN SIE NICHT DIE I/O-TASTE!

1. Öffnen Sie die Toolbox.
2. Wählen Sie das Menü SYSTEM.
3. Wählen Sie das Menü „Energiesparoptionen und Belegung der I/O-Taste.“
4. Wählen Sie die Option „Windows-Neustart“.


Können Sie die Toolbox nicht mehr öffnen, so gehen Sie so vor:


1. Minimieren Sie die NuVoice-Software. Der Windows-Desktop wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf „Start“ .
3. Tippen Sie auf „Ein/Aus“ .

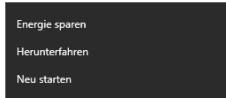

4. Wählen Sie „Neu starten“ . Der Accent startet neu.

Können Sie die Toolbox nicht mehr öffnen und haben Sie geschlossenes System, schließen Sie eine USB-Tastatur an den Accent an:

1. Drücken Sie auf der Tastatur gleichzeitig die Tasten Strg + Alt + Entf.
2. Der Bildschirm „Benutzer wechseln“ wird angezeigt.
3. Drücken Sie wiederholt die Tab-Taste, bis das I/O-Zeichen  markiert wird.
4. Drücken Sie die Eingabetaste.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „Neu starten“ aus.
6. Drücken Sie die Eingabetaste.

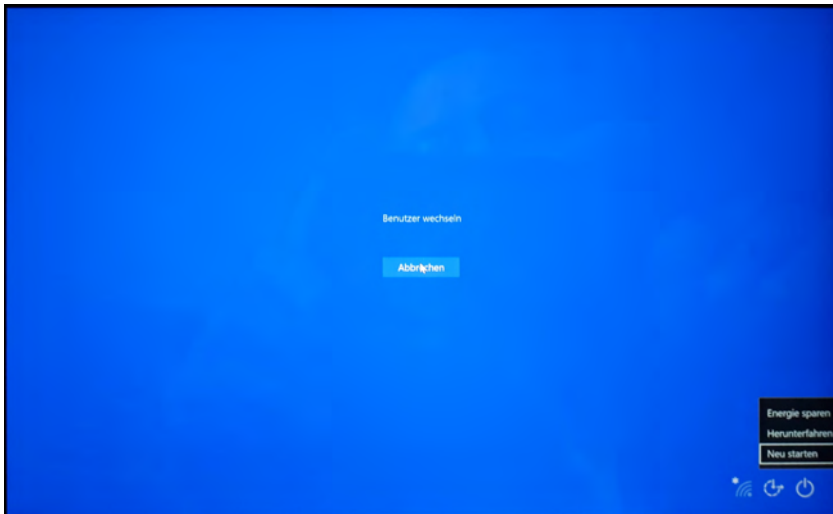

Führt keiner dieser Schritte zum Erfolg, gehen Sie so vor:


Ungesicherte Daten gehen dabei verloren!

1. Drücken und Halten Sie die I/O-Taste oben auf dem Gerät. Der Accent fährt herunter.
2. Drücken Sie die I/O-Taste erneut, um das Gerät wieder zu starten.



Sollte ihr Gerät weiterhin nicht starten, befolgen Sie die Hinweise im nächsten Kapitel „Windows neu installieren“.


Windows neu installieren

Die Neuinstallation löscht sämtliche auf dem Gerät vorhandene Daten!

 **Eine Neuinstallation dauert 30 Minuten bis 1 Stunde.** Sie müssen am Anfang und zum Ende dabei sein, um Eingaben vornehmen zu können. Dazwischen läuft der Installationsprozess automatisch ab.

Diese Anleitung gilt für offene Systeme. Haben Sie ein geschlossenes System, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von PRD.


1. Schließen Sie das Netzteil an.
2. Minimieren Sie die NuVoice-Software, um den Desktop zu sehen.
3. Tippen Sie auf „Start“ .
4. Tippen Sie auf „Einstellungen“ .
5. Wählen Sie die Option „Update und Sicherheit“.
6. Wählen Sie links das Menü „Wiederherstellung“.
7. Wählen Sie die Option „Diesen PC zurücksetzen“. Tippen Sie dazu auf „Los geht's“.
8. Das Fenster „Diesen PC zurücksetzen“ erscheint.

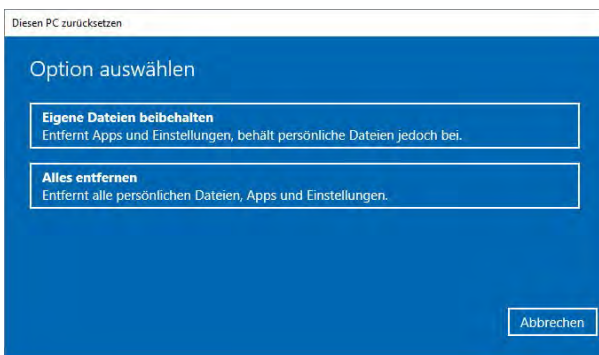

Wählen Sie „Eigene Dateien beibehalten“, wenn Sie Ihre Dateien behalten wollen. Wählen Sie „Alles entfernen“, wenn Sie Ihre Dateien löschen wollen.

9. Haben Sie „Alles entfernen“ gewählt, erscheint das Fenster „Der PC besitzt mehr als ein Laufwerk“.
Wählen Sie „Nur das Laufwerk, auf dem Windows installiert ist“, wenn Sie die Dateien auf der internen Speicherkarte nicht löschen wollen.
Wählen Sie „Alle Laufwerke“, wenn Sie neben dem Windows-Laufwerk auch Dateien auf der internen Speicherkarte löschen wollen.
10. Das Fenster „Möchten Sie auch die Laufwerke bereinigen?“ erscheint.
Wählen Sie „Nur meine Dateien entfernen“, wenn Sie nur Ihre Dateien entfernen wollen.
Wählen Sie „Dateien entfernen und Laufwerk bereinigen“, wenn Sie neben dem Löschen der Dateien auch die Laufwerke bereinigt haben möchten.
11. Das Fenster „Bereit zum Zurücksetzen dieses PCs“ erscheint. Wählen Sie „Zurücksetzen“, um den das Zurücksetzen zu starten, oder „Abbrechen“.

Windows einrichten










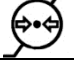



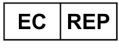
1. Nach Abschluss des Zurücksetzens folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zum Einrichten von Windows.
2.  Wählen Sie als **Kontoname** unbedingt **Accent 1000**.
3. Beim ersten Starten von NuVoice müssen Sie die Lizenzbedingungen akzeptieren.
4. NuVoice startet. Spielen Sie Ihre Datensicherung wieder ein oder wählen Sie ein Vokabular.
5. Führen Sie ein Software-Update durch, um NuVoice auf die neueste Version zu aktualisieren.
6. Führen Sie Windows-Updates durch, um Windows auf den aktuellen Stand zu bringen.

ANHANG

Konformitätsinformationen

Symbole und Kennzeichnungen

Folgende Symbole werden auf dem Gerät, dem mitgelieferten Zubehör und der Verpackung verwendet:

| Symbol | Erklärung |
|--|---|
|  | Das Gerät entspricht den Bestimmungen der US-Funk- und Fernmeldebehörde (Federal Communications Commission, FCC) |
|  | Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen. Es gibt ein getrenntes Sammelssystem für gebrauchte elektronische Produkte, über das die richtige Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung gemäß der bestehenden Gesetzgebung gewährleistet wird. |
|  | Das Gerät entspricht den EU-Bestimmungen für Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz |
|  | Das gesamte Gerät mit Ausnahme des Netzteils und den Signalein- und -ausgabeports ist ein Anwendungsteil des Typs BF. „Anwendungsteil“ bezieht sich auf den Teil des Geräts, mit dem der Benutzer bei bestimmungsgemäßer Nutzung in physischen Kontakt kommt. |
|  | Das Gerät strahlt allgemein erhöhte, potenziell gefährliche Mengen von nicht-ionisierender elektromagnetischer Strahlung aus. |
|  | Achtung! Lesen Sie alle Warnungen und Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung. |
|  | Schützen Sie das Gerät vor Wasser. |
|  | Temperatur der Betriebsumgebung während der Benutzung, bei Transport und bei Lagerung. Bitte beachten Sie auch den Abschnitt „Temperaturbedingungen für direkten Kontakt“ auf Seite 57. |
|  | Relative Luftfeuchtigkeit der Betriebsumgebung während der Benutzung, bei Transport und bei Lagerung |
|  | Atmosphärendruck während der Benutzung, bei Transport und bei Lagerung |
|  | Befolgen Sie die Bedienungsanleitung. Schlagen Sie im Handbuch nach. |
|  | Das Gerät verwendet die Bluetooth-Funktechnologie. |
|  | Name und Adresse des Herstellers des Geräts. |
|  | Der Bevollmächtigte in der EU. |

FCC-Erklärung

Dieses Gerät wurde typengeprüft und entspricht laut Abschnitt 15 der Bestimmungen der US-Funk- und Fernmeldebehörde (Federal Communications Commission, FCC) den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B. Diese Bestimmungen dienen dazu, in Wohnräumen einen angemessenen Schutz gegen Funkstörungen zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet HF-Energie und strahlt diese u.U. auch ab. Bei unsachgemäßer Installation und unsachgemäßem Betrieb, die von den Anweisungen des Herstellers abweichen, kann eine Funkstörung auftreten. In bestimmten Installationen ist das Auftreten von Störungen jedoch nicht auszuschließen. Sollte dieses Gerät den Empfang von Funk- und Fernsehsendungen stören (Feststellbar durch das Ein- und Ausschalten dieses Gerätes), können die folgenden Behebungsmaßnahmen einzeln oder im Verbund eingesetzt werden:

- Verlegung oder Neuausrichtung der Empfangsantenne.
- Aufstellung des Gerätes in einer größeren Entfernung vom Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an eine andere Steckdose, so dass dieses Gerät und der Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.
- Gegebenenfalls kann der Fachhändler oder ein erfahrener Funk- und Fernseh-techniker weitere Ratschläge geben.

Änderungen und Modifikationen, die ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung der PRC-Salttillo vorgenommen wurden, können zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

Für Kanada

Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt alle Anforderungen der kanadischen ICES-003-Bestimmungen. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Funktechnologien

Geräte mit Funktechnologie wie drahtlose Netzwerkgeräte, Mobiltelefone, Schnurlos-telefone und ihre Basisstationen sowie Sprechfunkgeräte können dies Gerät beeinflussen. Halten Sie mit diesem Gerät stets einen Abstand von mindestens 15 cm zu Geräten mit Funktechnologie ein.

Limitierung auf Zweckbestimmung, Ansprüche Dritter und Datenverlust

- PRC-Salttillo und die Prentke Romich GmbH übernehmen keine Gewähr für irgendeine Funktionalität dieses Geräts außerhalb der ausdrücklichen Gewährleistung in Bezug auf die Zweckbestimmung als Kommunikationshilfe. PRC-Salttillo und die Prentke Romich GmbH übernehmen keine Gewähr für Softwares von Dritten und sind nicht verantwortlich für Verletzungen, Schäden oder Verluste, die aus Programmfunktionen oder Programmfehlern von Technologien von Dritten, Internetseiten, Produkten und Programmen resultieren. Weitere Anwendungen könnten eine weitere klinische Bestimmung über die Möglichkeiten eines Sprachausgabegeräts hinaus erforderlich machen.
- Weder die Prentke Romich GmbH noch PRC-Salttillo übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die Dritten durch die Benutzung dieses Geräts entstanden sein könnten.
- Weder die Prentke Romich GmbH noch PRC-Salttillo übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste im Falle eines Datenverlustes aufgrund einer Fehlfunktion, einer Reparatur oder eines Akkuwechsels. Sichern Sie stets alle relevanten Daten auf einem externen Speichermedium.

Zweckbestimmung

Dieses Gerät ist ein Hilfsmittel zur Unterstützten Kommunikation (UK) für Menschen, die aufgrund einer Verletzung, Behinderung oder Krankheit über eine eingeschränkte Sprechfähigkeit verfügen. Das Gerät ermöglicht seinem Benutzer verbesserte Möglichkeiten der Kommunikation und größere Unabhängigkeit.

Das Gerät inkl. seiner Software zur Sprachdarstellung gibt dem Benutzer die Möglichkeit, Konversationen zu initiieren, Informationen einzuholen, seine Meinung auszudrücken sowie Gefühle und Bedürfnisse mitzuteilen. Es kann zur Benutzung in der Hand gehalten oder mittels eines geeigneten Halterungssystems auf einem Tisch, an einem Rollstuhl oder an einem Bett befestigt werden. Die Ansteuerung kann – einzeln oder in Kombination – direkt mit der Hand erfolgen oder mittels geeigneter Eingabegeräte wie Augensteuerung, Maus, Trackball, Kopffmaus oder externen Tasten.

Der Look Eyetracker ermittelt die Blickrichtung des Benutzers des Geräts und ermöglicht es dem Benutzer so, Eingaben nur mit den Augen (ohne weiteren motorischen Aufwand) vorzunehmen und die volle Kontrolle über das Gerät auszuüben.

Das Look-Modul wird dazu an das Gerät des Benutzers montiert, welches wiederum an einer Tischhalterung, einem Bettständer oder einem Bodenständer befestigt wird

Das Gerät enthält keine medizinischen Substanzen, menschliches Blut oder Plasmaprodukte und wird ohne die Verwendung von Gewebe tierischen Ursprungs hergestellt.

Kontraindikationen



Dieses Gerät ist nicht gedacht oder geeignet als Notrufgerät oder als alleinige Kommunikationshilfe. Falls dieses Gerät ausfällt, kann es vom Benutzer nicht zur Kommunikation verwendet werden!

Vorgesehene Nutzungsdauer

Die vorgesehene Nutzungsdauer des Geräts, des Ladegeräts sowie des Zubehörs beträgt 5 Jahre. Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen. Privathaushalte in den Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen können ihre gebrauchten elektronischen Produkte an vorgesehenen Sammeleinrichtungen kostenfrei abgeben oder aber an den Händler zurückgeben, von dem sie es erworben haben.

Vorgesehene Betreiber/Anwender

Vorgesehene Betreiber/Anwender sind

- die Person, die das Gerät zur Kommunikation einsetzt,
- der Kommunikationspartner der Person, die das Gerät zur Kommunikation einsetzt
- Menschen, die Einstellungen im Gerät vornehmen, Gerätesoftware aktualisieren, das Gerät reinigen oder desinfizieren

Die in dieser Anleitung gemachten Angaben und Grafiken helfen den vorgesehenen Betreibern/Anwendern, das Gerät zweckbestimmt einzusetzen.

Position bei der Benutzung

Bei normaler Benutzung befindet sich das Gerät in einem Abstand von 30 - 35 cm vor dem Benutzer. Der Abstand hängt davon ab, ob das Gerät in der Hand gehalten wird oder an einem Halterungssystem montiert ist. Bei der Benutzung einer Augensteuerung ist der Abstand größer.

Bei Verwendung der Augensteuerung Look muss das Gerät auf einer Halterung befestigt sein. Der Benutzer sollte sich in einem Bereich von 56 - 66 cm vor dem Gerät befinden.

Besondere Fähigkeiten und Vorkenntnisse

Es sind keine besonderen Fähigkeiten oder Vorkenntnisse erforderlich, um das Gerät zu verwenden und/oder zu warten. Die in dieser Anleitung gemachten Angaben und Grafiken helfen den vorgesehenen Betreibern/Anwendern, das Gerät zweckbestimmt einzusetzen.

Anleitung zur Benutzung

- Die Nutzung aller Gerätefunktionen ist für den Benutzer unbedenklich. Um beste Ergebnisse zu erzielen, befolgen Sie die Angaben in dieser Anleitung.
- Bei täglicher Benutzung besteht keine Notwendigkeit, das Gerät oder den Verstärker auszuschalten. Es wird empfohlen, es bei Nichtbenutzung in den Standby-Modus zu setzen, es täglich zu laden und einmal pro Woche einen Neustart durchzuführen.
- Vorkommnisse melden Sie bitte umgehend Ihrem Händler, der Prentke Romich GmbH sowie ihrer zuständigen Aufsichtsbehörde.
- Informationen zur Reinigung und zu hygienischen Wiederaufarbeitung finden Sie in den Kapiteln „Reinigung“ und hygienische Wiederaufarbeitung“ (siehe S. **Fehler!** **Textmarke nicht definiert.**).

Soll das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht genutzt werden, bringen Sie es in den Transportschutzmodus und lagern Sie es an einem trockenen, geschützten Ort. Laden Sie das Gerät spätestens alle 6 Monate auf.

Kontaktinformation

Benötigen Sie Hilfe bei der Einrichtung, Benutzung oder Wartung des Geräts oder wollen Sie ein ungewöhnliches Verhalten oder ein ungewöhnliches Ereignis des Geräts melden, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die Prentke Romich GmbH unter Tel. +49 (0)561 78559-16 bzw. E-Mail technik@prentke-romich.de.

Informationen zur Lagerung

Sollten Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen wollen, so fahren Sie es komplett herunter und lagern Sie es an einen kühlen, trockenen Ort. Gelagerte Geräte müssen spätestens alle 6 Monate geladen werden.

Ladegerät/Netzteil

Zu diesem Gerät ist das folgende Netzteil kompatibel:

Megmeet MANGO60S-18BB-PRC (erhältlich bei PRC-Saltillo bzw. PRD).



Verwenden Sie nur dieses Netzteil zum Laden der in das Gerät eingebauten Akkus.

Inspektion / Wartung gemäß §7 MPBetreibV

Der Betreiber hat Prüfungen nach DIN EN 62353 (VDE 0751-1) durchzuführen oder durchführen zu lassen. Er hat für die Prüfungen solche Fristen vorzusehen, dass entsprechende Mängel, mit denen aufgrund der Erfahrung gerechnet werden muss, rechtzeitig festgestellt werden können. Die Prüfungen sind jedoch spätestens alle zwei Jahre mit Ablauf des Monats durchzuführen, in dem die Inbetriebnahme des Medizinproduktes erfolgte oder die letzte Überprüfung durchgeführt wurde.

Klassifikationen

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Schutz gegen elektrischen Schlag | Klasse II / interne Stromversorgung |
| Betriebsweise | kontinuierlich |
| Art des Anwendungsteils | BF |

Technische Daten Accent 1000

| | |
|---|--|
| Bildschirm | Kapazitiver 10,1"-Touchscreen (25,7 cm) |
| Bildschirmauflösung | 1980 x 1200 Bildpunkte |
| Abmessungen (BxHxT) | 26,0 x 17,6 x 3,3 cm (ohne Griff) / 26,0 x 17,6 x 6,0 cm (mit Griff) |
| Gewicht | 1,33 kg (ohne Rahmen) / 1,41 kg (mit Rahmen) |
| Kamera | 2,0 Megapixel (Front), 5,0 Megapixel (Rückseite) |
| Prozessor | Intel Atom x5-Z8350 / 1,44 GHz |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Betriebssystem | Windows 10 Pro |
| Speicher | 128 GB SSD |
| Anschlüsse | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| | 1 x USB 2.0 für Augensteuerung NuEye |
| | 1 x USB 2.0 für Kopfmaus NuPoint |
| | 1 x Mini-USB 2.0 Ausgang für Computersteuerung |
| | 1 x Micro-SD-Karte |
| | 1 x Micro-HDMI |
| | 2 x 3,5 mm-Klinkenbuchse für externe Einer-/Zweiertaste |
| | 1 x 3,5 mm-Klinkenbuchse für Kopfhörer |
| Schnittstellen | Bluetooth Klasse 2 |
| | IR-Umfeldkontrolle |
| Akkulaufzeit | 8-10 h |
| Ladegerät / Netzteil | Megmeet MANGO60S-18BB-PRC, 18 V / 3,4 A |
| Lieferumfang | Rahmen, Griff, Ständer, Ladegerät, USB-Stick, Stylus |
| Lieferbares Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) | Trage- und Transporttasche mit Schultergurt, Tragegurt, Bildschirmschutzfolie, Befestigungsplatte für Halterungssystem, Fingerführungsgitter, Fingerführungshilfe, interne Kopfmaus NuPoint, interne Augensteuerung Look |

Technische Daten Look 1.1 Eyetracker

| | |
|-------------|----------------------------|
| Modell | PRCL-1.1 |
| Gewicht | 45 g |
| Abmessungen | 17,0 cm x 4,4 cm x 2,54 cm |

Betriebsumgebung

| | |
|--|--------------------|
| Umgebungstemperatur | 0°C bis 40°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% bis 90%. |
| Atmosphärendruck | 80 kPa bis 106 kPa |
| Schützen Sie das Gerät bei der Benutzung vor Feuchtigkeit. | |

Umgebungsbedingungen bei Transport und Lagerung

| | |
|---|--------------------|
| Umgebungstemperatur | -20°C bis 60°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% bis 90%. |
| Atmosphärendruck | 80 kPa bis 106 kPa |
| Schützen Sie das Gerät bei Transport und Lagerung vor Feuchtigkeit. | |

Temperaturbedingungen für direkten Kontakt

Bedingungen für einen sicheren Kontakt – Zeit

| Zugänglicher Teil | Zeitlimit für Kontakt |
|---------------------------|-----------------------|
| Touchscreen | Weniger als 1 Minute |
| Plastikgehäuse des Geräts | Weniger als 1 Minute |
| Gerätetasten | Weniger als 1 Minute |

Bedingungen für einen sicheren Kontakt – Temperatur

| Zugänglicher Teil | Maximale Temperatur während der Benutzung bei einer Umgebungstemperatur von 40 °C |
|-----------------------------|---|
| Touchscreen | 54,3 °C |
| Plastikgehäuse des Geräts | 50,5 °C |
| Tasten (I/O, lauter/leiser) | 41,2 °C |



Das Berühren der Geräteoberfläche mit einer Hautverletzung kann die Wunde verschärfen



Kinder und andere Risikogruppen sollten die Geräteoberfläche nicht berühren, wenn die Möglichkeit einer Verbrennung besteht.

Endkunden-Lizenzvereinbarung

Sie haben ein Gerät erworben, das Software enthält, die PR-Salttillo durch eine oder mehrere Lizenzgeber (Microsoft Licensing Inc., eine 100%ige Tochtergesellschaft der Microsoft Corporation), lizenziert wurde. Diese Software-Produkte inklusive aller Begleitmaterialien, Online- oder elektronischer Dokumentationen (die „SOFTWARE“) unterliegen deutschen sowie internationalen Urheberrechtsbestimmungen sowie weiteren Gesetzen zum Schutz des geistigen Eigentums. Die Software wird nicht verkauft, sondern ihre Nutzung erfolgt unter Lizenz.

Falls Sie den Bestimmungen dieser Endkunden-Lizenzvereinbarung (EULA) nicht zustimmen, benutzen Sie das Gerät nicht und kopieren Sie keine Software. Wenden Sie sich unverzüglich an Prentke Romich Deutschland und fragen Sie nach, wie Sie das unbenutzte Gerät gegen volle Rückerstattung des Preises zurückgeben können. Durch Benutzung der Software und/oder durch die Benutzung der Gerätes zeigen Sie Ihr Einverständnis mit der folgenden Endkunden-Lizenzvereinbarung an.

Microsoft Lizenz-Gewährung

Die SOFTWARE ist nicht gekauft, sie darf in Lizenz genutzt werden. Diese Endkunden-Lizenzvereinbarung gewährt Ihnen folgende Rechte an der SOFTWARE:

- **Die Software darf nur in Verbindung mit diesem Gerät verwendet werden.**
- **Keine Fehlertoleranz.** Diese SOFTWARE ist nicht fehlertolerant. PRC-Salttillo hat eigenständig festgelegt, wie die SOFTWARE zu benutzen ist und Microsoft verlässt sich darauf, dass PRC ausreichend getestet hat, dass die SOFTWARE für die beabsichtigten Zwecke geeignet ist.
- **Hinweis zur Unterstützung von Java.** Die SOFTWARE kann Unterstützung für Programme enthalten, die in Java geschrieben wurden. Die Java-Technologie ist nicht fehlertolerant und wurde nicht entwickelt, hergestellt oder geplant zur Benutzung oder zum Wiederverkauf als Steuerungssystem in gefährdeten Umgebungen, die fehlerfreien Betrieb erfordern wie z. B. Atomanlagen, Navigations- und Kommunikationssysteme von Flugzeugen, Geräte zur Flugsicherheit, medizinische Geräte oder Waffensysteme, bei denen ein Versagen der Java-Technologie direkt zum Tod oder zum Schaden von Menschen oder zur Beschädigung der Umwelt führen kann.
Sun Microsystems Inc. hat Microsoft vertraglich verpflichtet, diesen Hinweis abzudrucken.
- **Keine Haftung für bestimmte Schäden.** Microsoft übernimmt über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus keine Haftung für irgendwelche Schäden, die sich aus der Nutzung der SOFTWARE ergeben. Das gilt ohne Einschränkung auch für implizite Garantien auf Marktgängigkeit und Eignung der SOFTWARE für einen bestimmten Zweck. Die Haftung von Microsoft ist auf einen Höchstbetrag von zweihundertfünfzig US-Dollar (US-\$ 250) beschränkt.
- **Einschränkungen beim Zurückentwickeln, Dekompilieren und Entassemblieren.** Sie dürfen die SOFTWARE nicht zurückentwickeln (reverse engineering), dekompilieren oder entassemblieren außerhalb der gesetzlichen Bestimmungen.
- **Begrenzte Weitergabe der SOFTWARE erlaubt.** Sie dürfen die SOFTWARE und jedwede begleitende Hardware und Benutzerdokumentation auf Dauer übertragen, vorausgesetzt, dass Sie keine Kopien zurückbehalten und sich der Empfänger mit den Bestimmungen dieses Vertrages einverstanden erklärt. Falls es sich bei der SOFTWARE um eine aktualisierte Version (Update) handelt oder diese aktualisiert worden ist, muss jegliche Übertragung das neueste Update und alle früheren Versionen umfassen.
- **Export-Beschränkungen.** Sie erkennen an, dass es sich um Software US-amerikanischen Ursprungs handelt. Sie sind mit der Einhaltung aller geltenden internationalen und nationalen Gesetze einverstanden, die für die Software gelten, einschließlich der US-Exportkontrollgesetze sowie der von der US-Regierung und anderen Regierungen erlassenen Beschränkungen in Bezug auf den Endverbraucher, die endgültige Verwendung und das Ziel-land. Zusätzliche Informationen zum Export der Software erhalten Sie unter <http://www.microsoft.com/exporting/>.

INDEX

A

Abdeckgitter reinigen 41
Accent 1000 auf einen Halterungssystem
befestigen 30
Accent 1000 benutzen 39
Akku laden 17
Akku-/Lade-Anzeige 17
Akku-Problembeseitigung 46
Anzeigegerät und -art wählen 33
Audiowiedergabe auf Accent umstellen 33
Aufstellbügel 19
Aufstellfuß 19

B

Befestigungsplatte demontieren 30
Befestigungsplatte für Halterungssysteme
montieren 30
Belegung der I/O-Taste 38

C

Clips (Tragegurt) 29
Clipverschluss (Tragegurt) 29
Computersteuerung 35
Computersteuerung, drahtlos 35
Computersteuerung, kabelgebunden 35

D

Deaktiviert (Belegung der Ein/Aus-Taste) 38
Den Accent 1000 kennen lernen 11
Desinfektion 41
Desinfizieren 43
Display ausschalten nach 38
Display reinigen 41
Displayschutzfolie montieren 21
drahtlose Computersteuerung 35
drahtlose Internetverbindung einrichten 36

E

Ein/Aus-Taste 14
Einschalten 16
Endkunden-Lizenzvereinbarung 58
Energiemanagement 38
Entfernen von Flüssigkeit 41
Entfernen von Speichel 41
Entsorgung 18
Eyetracker montieren 31

F

Fingerführung reinigen 41
Fingerführungsgitter demontieren 26
Fingerführungsgitter hochklappen 26
Fingerführungsgitter montieren 25
Fingerführungshilfe demontieren 28
Fingerführungshilfe montieren 27

G

Gehäuse reinigen 41
Gerät benutzen aus dem
Transportschutzmodus 40
Griff 14
Griff demontieren 20
Griff montieren 20

H

Halterungssystem, Befestigung auf 30
HDMI-Ausgang verwenden 33
Herunterfahren (Belegung der Ein/Aus-
Taste) 38
Hinweise 2
Hinweise zum Wiedereinsatz 44
hygienische Wiederaufbereitung 43

I

I/O-Taste 14
Implantierbare Medizinprodukte 10
Infrarotfenster 14
Inhaltsverzeichnis 3
Inspektion / Überprüfung gemäß §7
MPBetreibV 55
Internetverbindung einrichten 36

K

kabelgebundene Computersteuerung 35
Konformitätsinformationen 51, 52
Kopfmaus montieren 32

L

Linke und rechte Seite des Accent 1000 15
Look montieren 31

N

NuPoint montieren 32

O

Oberseite des Accent 1000 14

P

Pannenhilfe 47
Pinlock 30
Portabdeckung demontieren 20
Portabdeckung montieren 20

R

Rahmen montieren 22, 23
Rahmen verschrauben 24
Reinigung 41, 42
Reset (Ausschalten erzwingen) 14
Reset (Verstärker rücksetzen) 15
Rückseite des Accent 1000 13

S

Sicherheit 7

Sicherheitshinweise 4
Standby nach 38
Standby-Modus (Belegung der Ein/Aus-Taste) 38

T

Technische Daten 56
Touchscreen 16
Tragegriff 14
Tragegurt befestigen 29
Transportschutzmodus aktivieren 40
Troubleshooting 47

V

Verstärker-Reset) 15
Vorderseite des Accent 1000 12

W

Wiedereinsatz, Hinweise zum 44
Windows herunterfahren 38
Windows neu installieren 49
Windows Neustart 46
Windows normal starten 46
Windows-Energiemanagement 38
Windows-Fehlersuche 48
Windows-Neustart 38



Prentke Romich Deutschland
Unterstützte Kommunikation

Prentke Romich GmbH

Karhäuserstr. 3
D-34117 Kassel
Tel. (0561) 78559-0
Fax (0561) 78559-29
E-Mail info@prentke-romich.de
Web www.prentke-romich.de