

PRD-IDEEN DES MONATS

gut - toll - Mist

Alle Neune

Bei diesem Kegelspiel ist schon die Bastelei ein echter Spaß! Unsere Zielwörter und Materialien kommen dann vor allem bei dem gemeinsamen Wettspiel im Garten zum Einsatz! Wer wird Kegelmeister:in und trifft alle Neune?

DIESE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:

- 9 Flaschen aus Plastik
- Material zum Befüllen der Flaschen (Wasser, Linsen, Reis, Sand)
- Ball

DIESE PRD-PRODUKTE KÖNNEN EINGESETZT WERDEN:

- MINSPEAK®-Anwendungsprogramme Quasselkiste 45/60 oder Wortstrategie 84
- Anwendungsprogramme LoGoFoXX 32 oder LoGoFoXX 60
- Anwendungsprogramme MetaTalk DE 5x9 oder MetaTalk DE 6x11
- Wortschatz-App GoTalk Now
- GoTalk9+ oder GoTalk20+
- QuickTalker 12 oder QuickTalker 23
- 1 oder 2 sprechende Tasten (z.B. BIGmack oder Step-by-Step)

DAS GEHÖRT ZUR VORBEREITUNG:

- Verwendet Ihr Talkerbenutzer ein Anwendungsprogramm, drucken Sie die Datei mit den Sequenzen des entsprechenden Programms aus.
- Bei Nutzung des Anwendungsprogramms MetaTalk DE 5x9 speichern Sie bitte das Wort „Mist“ unter der vorgeschlagenen Sequenz ab.
- Verwendet Ihr Benutzer die Wortschatz-App GoTalk Now, laden Sie die Vorlage "PRD-Idee Mai 2022" aus der Online Galerie oder von unserer Homepage herunter (<https://www.prentke-romich.de/didaktische-materialien-fuer-priogeraete/#1590655769353-345f93a2-af40>).
- Zur Benutzung des GoTalks oder QuickTalkers verwenden Sie das beigegefügte Deckblatt. Besprechen Sie das Gerät gemäß den Vorschlägen.
- Beim Einsatz von sprechenden Tasten kennzeichnen Sie die Geräte mit den Symbolen und nehmen die entsprechenden Aussagen auf.

JETZT KANN ES LOSGEHEN!

- Das Kegelspiel kann bereits gemeinsam vorbereitet werden, indem die Plastikflaschen befüllt werden. Hier können Äußerungen, wie „mehr“, „genug“, „Halt!“, „schwer“ und „leicht“ eingesetzt werden. Oder sollen die Flaschen noch farbig angemalt oder beklebt werden? Seien Sie kreativ! Die vorgeschlagenen Zielwörter für das gemeinsame Basteln stehen heute allerdings nicht im Fokus unserer Idee und sind nicht in unseren aktuellen Materialien enthalten. Aber nutzen Sie doch unsere beliebten Werkzeuge „Schreiben mit Ikonen“ in der NuVoice-Emulation für die MINSPEAK®-Anwendungsprogramme oder „Eingaben mitschneiden“ im Chat-Editor für die LoGoFoXX-Programme. Die Emulationen findet Sie im Downloadbereich unserer Homepage.
- Das Bekleben der Kegel mit den Kommentaren „gut“, „toll“ und „cool“ ist optional möglich.
- Nun geht es ans Kegeln und ans Kommentieren! War der Wurf „gut“, „toll“ oder „Mist“? Oder sogar „voll gut“ oder „voll toll“? War der Ball „langsam“ oder „schnell“? Natürlich können auch die umgeworfenen Kegel gezählt werden und vielleicht kann auch „nochmal“ ein Versuch gestartet werden.

PRD-IDEEN DES MONATS

SO KANN ES WEITERGEHEN:

- Vermitteln Sie den Einsatz der Wörter „gut“, „toll“ und „Mist“ auch in anderen Spiel- und Alltagssituationen. Weitere Ideen finden Sie in der Datei „Zielwörter und Kurzideen“.

VIDOE ZU DIESER IDEE:

- Die Videobeschreibung dieser Idee finden Sie hier: <https://youtu.be/lrXev5ZOQ8Q>

Die „PRD-Ideen des Monats“ sind ein kostenloser Service der Prentke Romich GmbH. Nutzung auf eigene Gefahr. Die Prentke Romich GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die aus der Befolgung der hier gemachten Angaben resultieren könnten. Das Ein- bzw. Austragen in den Newsletter erfolgt unter www.prentke-romich.de.

Prentke Romich GmbH

Hilfsmittel für Unterstützte Kommunikation

Karhäuserstr. 3

34117 Kassel

Tel. (0561) 78559-0

Fax (0561) 78559-29

E-Mail info@prentke-romich.de

Web www.prentke-romich.de

