

Tipps für die Anwendung von RehaFoXX im Alltag

gut/schlecht



Unter **gut/schlecht** steht eine einfache Skala zum schnellen Kommentieren und Bewerten zur Verfügung.

Whiteboard



Nutzen Sie das integrierte **Whiteboard**, um bei Problemen in der Verständigung mit Hilfe von Buchstaben oder Zeichnungen den Gesprächsinhalt zu konkretisieren.

Fotos



Fotos bieten immer einen Gesprächsanlass. Auf den Seiten sind bereits zwei große Tasten vorgelegt, mit deren Hilfe man direkt ein Foto aufnehmen und auf der jeweiligen Taste durch mehrmaliges Bestätigen speichern kann.

Wochenplan



Die Tasten beim **Wochenplan** dienen nach entsprechender Anpassung als permanente Orientierungshilfe im Alltag.

(bitte wenden)

Strategien



Die **Strategien** umfassen Hilfestellungen zum Deblockieren und zur gemeinsamen Wortsuche, wenn Kommunikation ins Stocken gerät. Zusätzlich sind einzelne Ablaufpläne für Kommunikationsskripte in Alltagssituationen abrufbar.

so ähnlich wie



Die Taste „so ähnlich wie“ hilft beim Beschreiben, wenn Wörter noch nicht eingespeichert sind.

und du?



Mit der Frage „und Du?“ lässt sich der vorgespeicherte Inhalt der Seiten dialogorientiert in Gesprächen nutzen.



Für weiterführende Informationen nutzen Sie unsere Erklärvideos.


© Die PCS-Symbole ©1981–2023 von Tobii Dynavox. Alle Rechte vorbehalten. Wird mit Genehmigung verwendet.

Individualisierungen am NovaChat

Wählen Sie **1 Menütaste**
> **2 Editiermodus**,
um Änderungen
vorzunehmen




3 Der aktive
Editiermodus
wird durch
die eingeben-
dete rote Schrift
angezeigt:

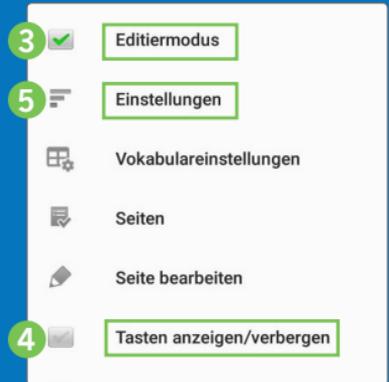

3 Editiermodus: RHF2_ [Essen_RHF2-24-PCS]

Wählen Sie **4 Menütaste** >
Tasten anzeigen/verbergen,
um auf der jeweiligen Seite nicht benötigte
Tasten auszublenden

(Hinweis: um auf eine andere Seite zu wechseln, muss der
Modus „Tasten anzeigen/verbergen“ stets erst deaktiviert
und beim Wechsel auf eine andere Seite wieder aktiviert
werden)

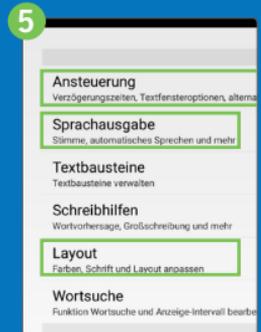

5 Wählen Sie **Menütaste** > **Einstellungen**,
um Anpassungen der Stimme (**Sprachausgabe** > **Sprachsynthese**
> **Stimme**) der Berührungsempfindlichkeit der Tasten
(**Ansteuerung**) oder des Schriftbildes (**Layout**) vorzunehmen

Zum Bearbeiten einer beliebigen Taste halten Sie diese so lange mit einem Finger gedrückt, bis ein Pop-Up-Menü auftaucht

7 Taste bearbeiten

Label = Tastenaufschrift

Mitteilung = gesprochener Text

Aussprache = Korrektur-

möglichkeit Bild (Kamera für ein

direktes Foto oder Laden von

Symbolen aus der PCS-Daten-

bank)



8 Tastengröße ändern

Höhe und Breite können hier

angepasst werden, aber Achtung: ver-

größerte Tasten verdecken ggfs. bereits

vorhandene Tasten

9 Wählen Sie **Menütaste > Editiermodus**,

um den aktiven Bearbeitungszustand

wieder auszuschalten

