

prentke romich deutschland weil jede:r was zu sagen hat!

Einführung in MetaTalk

Online Schulung am 24.09.2025





Wer sind wir?



Lena Fischer

- Beraterin bei Prentke Romich GmbH
- Heilpädagogin (B.A.)
- Unterwegs in Bayern



Anna Siegmund

- Beraterin bei Prentke Romich GmbH
- Heilpädagogin (B.A.)
 Sonderpädagogin (M.A.)
- Unterwegs in Baden-Württemberg



Was haben wir vor?

- Aufbau
- Didaktik
- Technik
- Fragen



M Die Startseite in vier Blöcken







Feste Leiste



- Wörter sind in allen Kategorien sichtbar
- Symbole können verändert und an Nutzer:innen angepasst werden
- Home-Taste



Personalpronomen



- Zum Bilden verschiedener Satzanfänge
- Spricht bei Tastendruck und wechselt zur Seite "Verben"
- "Verben" grammatikalisch angeglichen an Personalpronomen
- Bsp.: "Ich kann", "Wir wollen"



Gesprächssteuernde Aussagen/Kommentare

- Für eine alltagsorientierte und schnelle Kommunikation
- Dialogorientierte Strukturen
- Kommentare (z.B. Schimpfwörter, Sprüche)






Themenseiten und Kategorien



Hinweis: weiße Tasten sprechen sofort, blaue Tasten sprechen nicht und öffnen eine Seite



Aufbau der Themenseiten

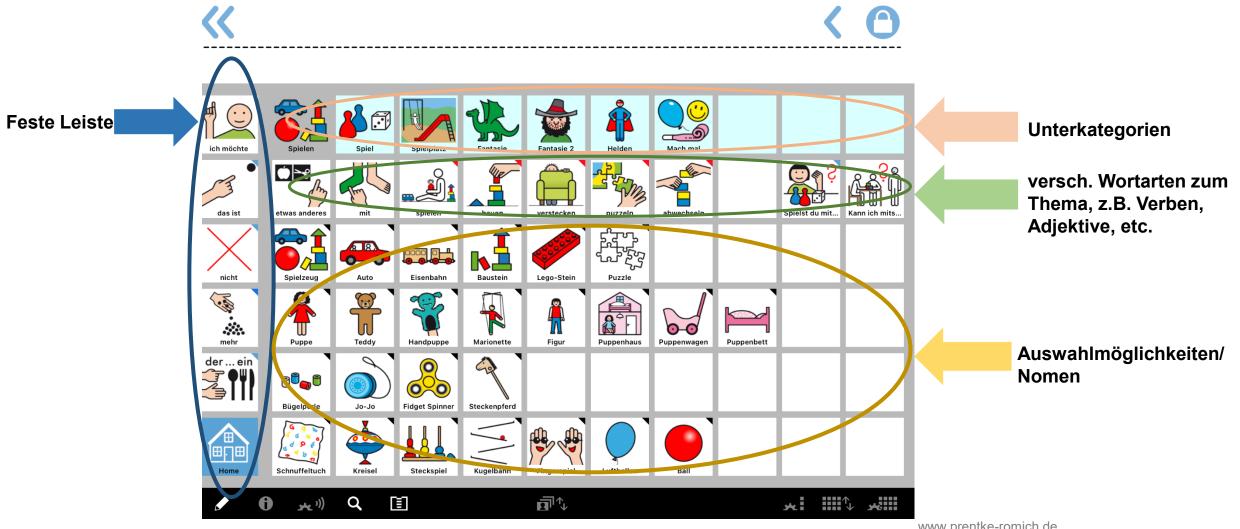

www.prentke-romich.de




Beim Drücken von Personalpronomen



- Personalpronomen wird ausgesprochen
- Seite mit gebeugten Verben öffnet sich



Beim Drücken von Verben

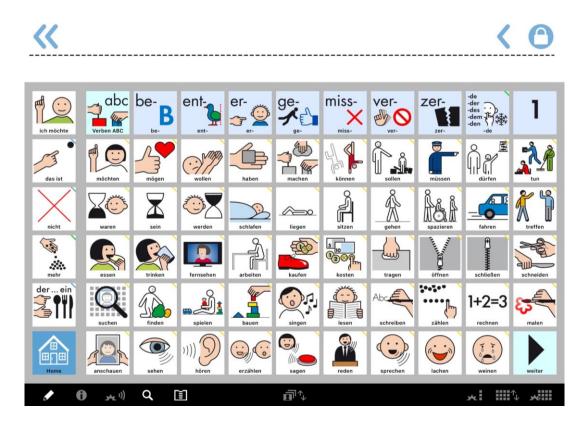

- Verben in der Grundform
- Kleiner Satz kann gebildet werden durch
- → Personalpronomen + angepasstes Verb + Verb in der Grundform
- → z.B. "Ich kann schwimmen" "Wir wollen spielen"



Durch Longpress von Verben




- Langes Drücken auf Verb öffnet Pop-up-Fenster
- Verb kann aus der Grundform konjugiert und in verschiedene Formen umgewandelt werden
- z.B. Formulierung einer Frage: "spielst"
- → Im Anschluss Personalpronomen drücken
- → "spielst du"

Hinweis: Grammatik Pop-ups durch Longpress auch bei Nomen und Adjektiven möglich



Durch "ge-Verben"

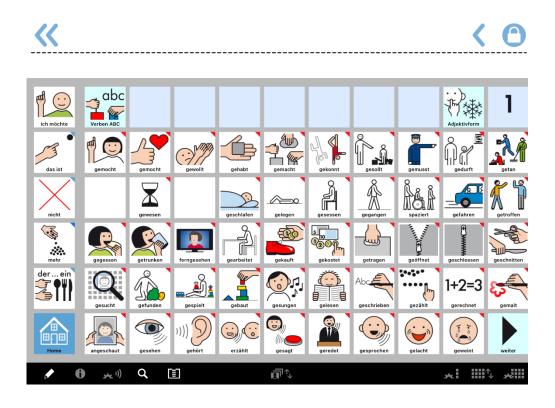

- Verb im Partizip Perfekt
- Form der Vergangenheitsbildung in Alltagssprache
- Kleiner Satz kann in Vergangenheit gebildet werden
- → Durch Personalpronomen und gebeugtes Verb + ge-Verb
- → z.B.: "Wir haben gesungen" "Ich bin geschwommen"



Übungssätze


Ich kann schwimmen



ich kann schwimmen


Wir haben gespielt



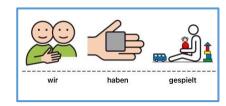


Spielst du mit



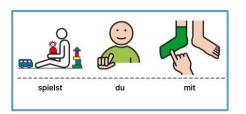




Alltagssituation EIS:

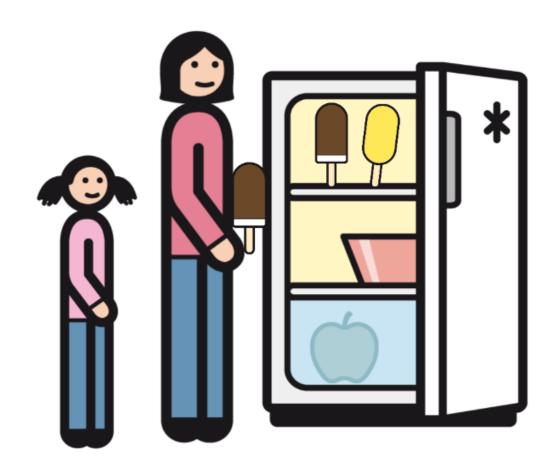



Was sagt ein ca. 3- jähriges Kind mit altersgerechter Sprachentwicklung?

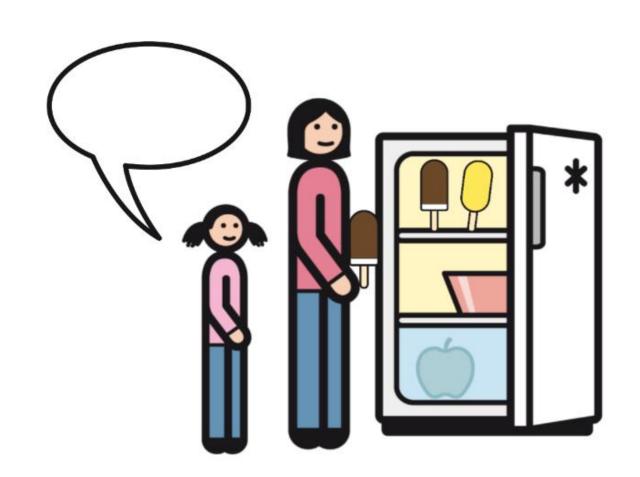







Welches Wort ist gewichtiger?



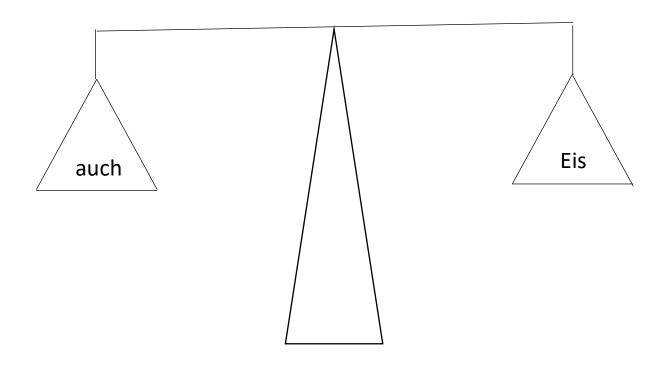

22.10.2025 ©Breitling, Gülden, Müller www.prentke-romich.de



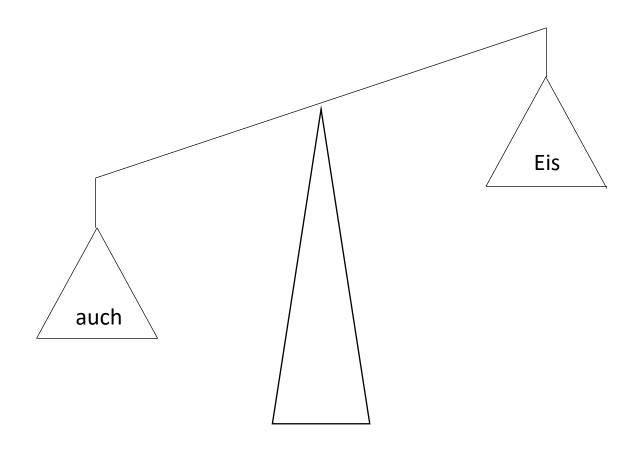

22.10.2025 ©Breitling, Gülden, Müller 20
















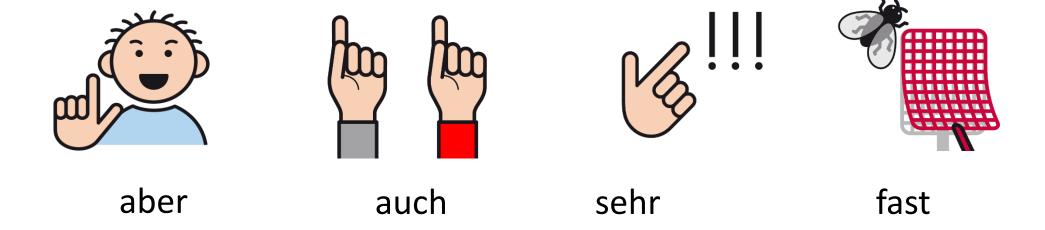

















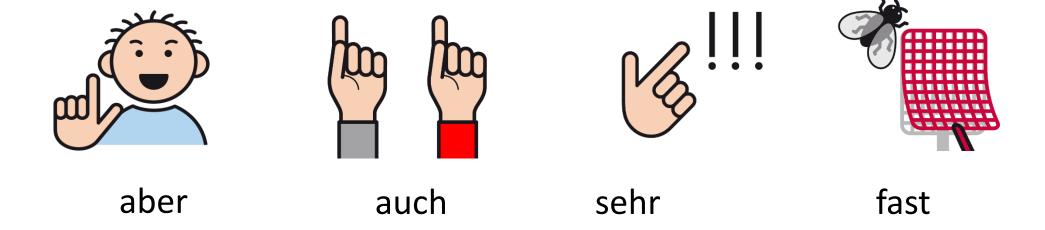




Wichtig und super zum Starten geeignet

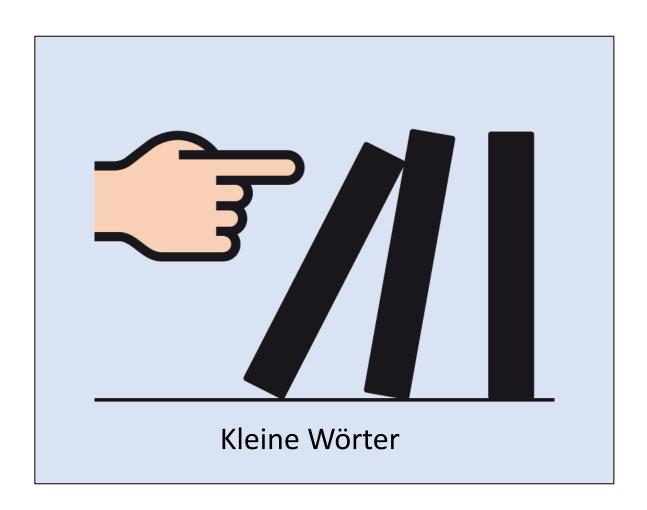



Wichtig und super zum Starten geeignet



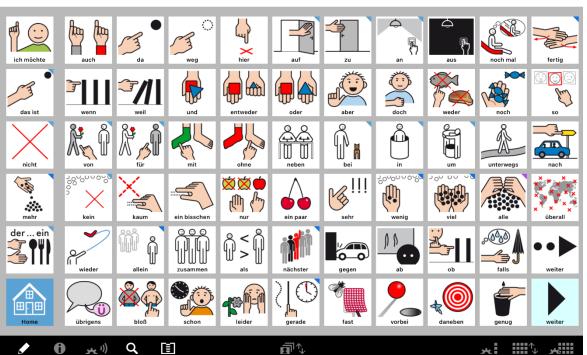


- Kernvokabular 80% der am häufigsten gesprochenen Wörter (beinhaltet hauptsächlich alle Wortarten außer Nomen)
- Sehr abstrakt
- Sollten immer wieder in den Fokus genommen werden, damit Nutzer:innen sich Symbole einprägen können
- Situationsunspezifische Wörter → können im Tagesablauf immer wieder eingesetzt werden (= Wiederholung)
- Unterstützung durch Zielvokabularposter



Wichtig und super zum Starten geeignet






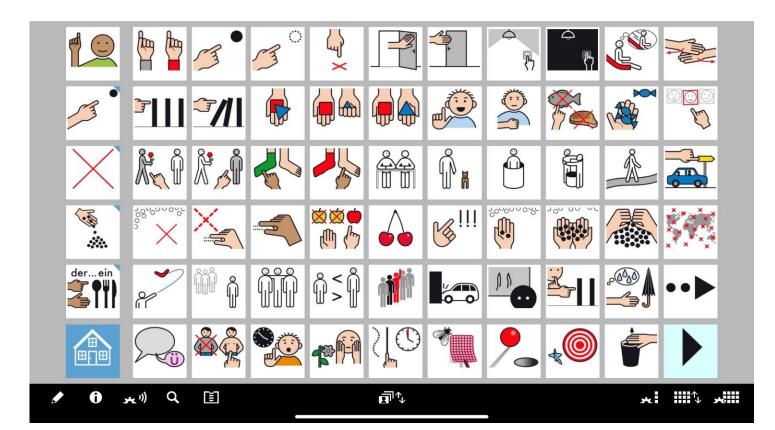


MetaTalk ohne Label



Wichtig und super zum Starten geeignet

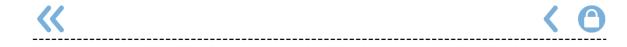

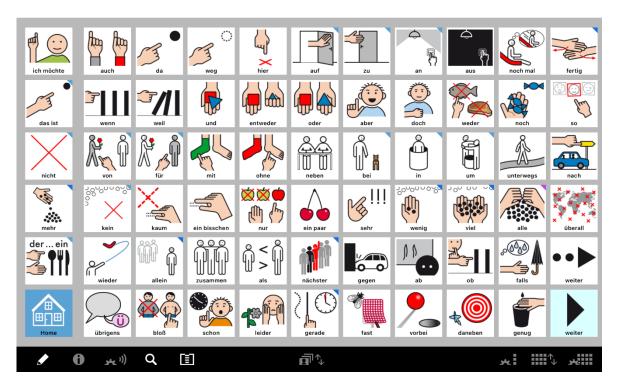


- Kernvokabular 80% der am häufigsten gesprochenen Wörter (beinhaltet hauptsächlich alle Wortarten außer Nomen)
- Sehr abstrakt
- Sollten immer wieder in den Fokus genommen werden, damit Nutzer:innen sich Symbole einprägen können
- Situationsunspezifische Wörter → können im Tagesablauf immer wieder eingesetzt werden (= Wiederholung)
- Unterstützung durch Zielvokabularposter
- Einfärben einzelner Wörter für bessere Orientierung



Didaktische Unterstützung

Durch das Zielvokabularposter

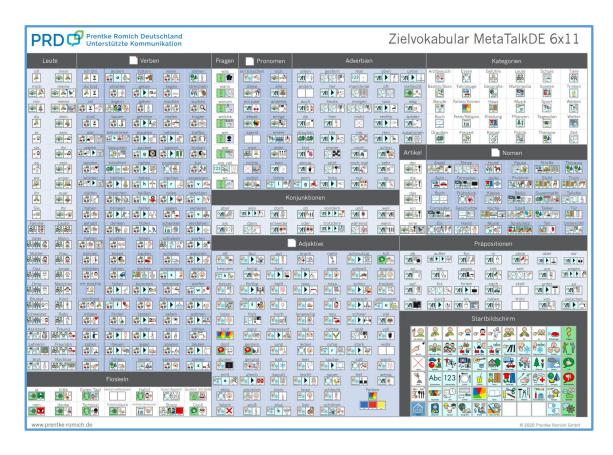

https://www.prentke-romich.de/produkt/zielvokabularposter-metatalk-6x11/



Wie kann das Poster eingesetzt werden?


- Poster soll zur Orientierung dienen
- Setzen von Fokuswörtern z.B. "alleine" und "zusammen" (am besten mit allen Beteiligten)
- Diese können auf Poster mit Folienstift markiert werden
- Fokuswörter Nutzer:innen in verschiedenen Situationen anbieten (über mehrere Wochen)
- Wörter sollen gemodellt (vorgemacht) werden, gleichzeitiges Mitsprechen möglich
- Wenn Fokuswörter erlernt, dann können neue Fokuswörter erprobt werden
- Beispiel "alleine", "zusammen"
- → Beim Anziehen, Zähneputzen, Brötchen schmieren, Jacke an-/ausziehen, Frühstücksbox holen, Schularbeiten ...




Kernthema: Modelling, gemeinsam Spaß mit dem Talker haben


ldee: Interaktionsspiele mit kleinen Wörtern

- z.B. Seifenblasen
- Mit Farbmarkierung oder Ausblenden arbeiten, um die Orientierung zu erleichtern

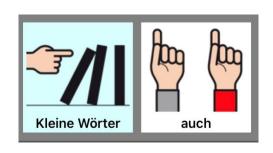



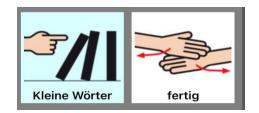

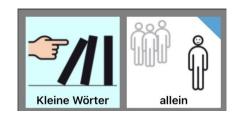


















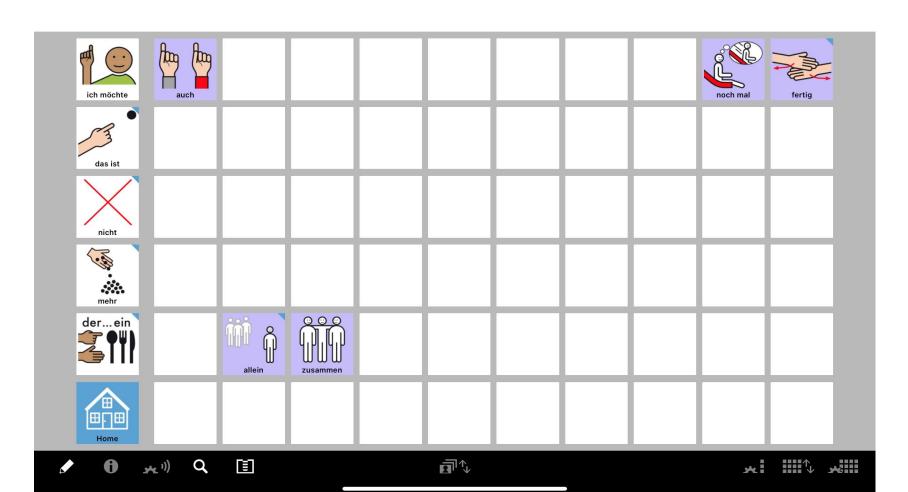





Kernthema: Modelling, gemeinsam Spaß mit dem Talker haben

Idee: Gemeinsame Erkundung der nicht-bildproduzierenden Symbole

- Symbole deren Bedeutung nicht sichtbar ist
- bei MTT hauptsächlich "kleine Wörter", Adjektive, Verben
- durch beschreiben der Symbole "der hat einen Fuß MIT Socke"

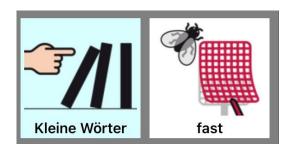

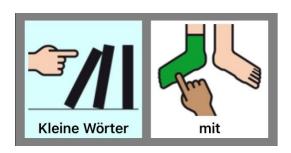





Kernthema: Modelling, gemeinsam Spaß mit dem Talker haben

Idee: Gemeinsame Erkundung der Themenseiten (z.B. Tiere, Fahrzeuge) ohne Spielzeug

- "Schau mal, da ist der Elefant" "Kannst du die Giraffe finden?"
- dabei Fokus auch auf die kleinen Wörter legen (z.B. gefährlich, streicheln)
- VORSICHT: KEIN REINES ABFRAGEN VON WÖRTERN

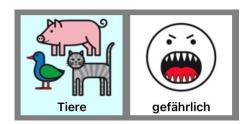

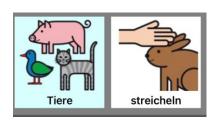





Kernthema: Modelling, gemeinsam Spaß mit dem Talker haben

Idee: Gemeinsame Erkundung der Themenseiten mit Spielzeug

- z.B. Schleichfiguren, Zoo bauen oder Fahrzeuge
- benennen, beschreiben und Gesagtes der Nutzer:innen ergänzen
- z.B. Krokodil "nicht streicheln"

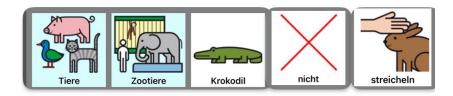



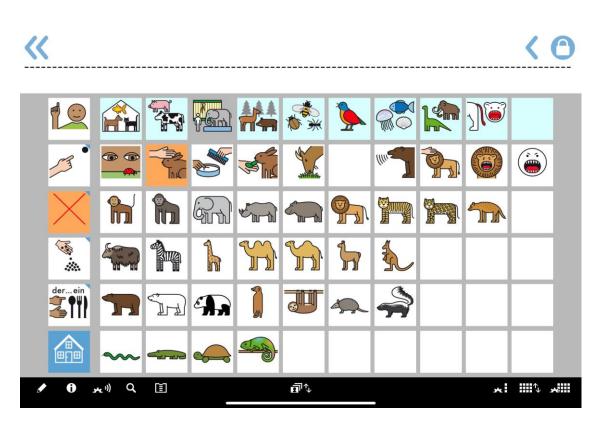






Kernthema: Modelling, gemeinsam Spaß mit dem Talker haben

Idee: Gemeinsame Erkundung der Themenseiten mit (Wimmel)Büchern

- beschreiben und benennen der Dinge, die im Buch abgebildet sind
- z.B. kleiner Fisch traurig, Tierarten und deren Farben





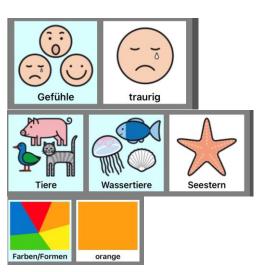


WICHTIG! Wenn Nutzer:innen auf Fragen/Aussagen in unseren Augen nicht adäquat reagieren, begegnet ihnen auf Augenhöhe! Klar machen: Ihr habt das Gesagte gehört, Quatsch (mit)machen.




Kernthema: Modelling, gemeinsam Spaß mit dem Talker haben

Ideen: Nutzer:innen Auswahl geben

- beim Spielen, Essen, Musik...
- Kern- UND Randwortschatz

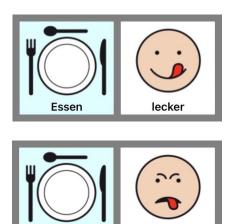

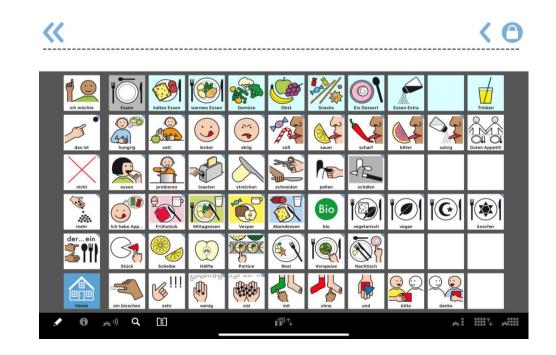


WICHTIG! Wenn Nutzer:innen auf Fragen/Aussagen in unseren Augen nicht adäquat reagieren, begegnet ihnen auf Augenhöhe! Klar machen: Ihr habt das Gesagte gehört, Quatsch (mit)machen.




Kernthema: Modelling, gemeinsam Spaß mit dem Talker haben

Idee: Kindgeführte Kommunikation

Kommentieren, was das Kind mit Talker sagt

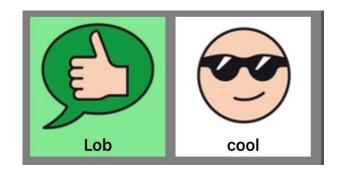

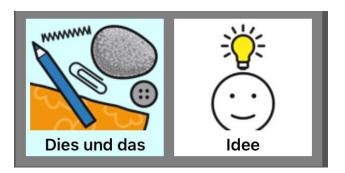

WICHTIG! Wenn Nutzer:innen auf Fragen/Aussagen in unseren Augen nicht adäquat reagieren, begegnet ihnen auf Augenhöhe! Klar machen: Ihr habt das Gesagte gehört, Quatsch (mit)machen.



Fazit

- Kleine Wörter sind wichtig!!!
- Wörter in bestehenden Kategorien nutzen; am besten ist es, zunächst keine neuen Seiten und Kategorien zu erstellen
- Denkt kindgeleitet; lernt Sprache nicht, indem ihr nach Wörtern fragt (Wetter, Wochentag), sondern durch Alltagskommunikation (kleine Wörter etc.)
- Wörter "üben" heißt nicht "arbeiten" -> Alltagskommunikation, Spaß haben!!!
- Wenn Nutzer:innen auf Fragen/Aussagen in unseren Augen nicht adäquat reagieren, begegnet ihnen auf Augenhöhe! Klar machen: Ihr habt das Gesagte gehört, Quatsch (mit)machen, oder sagen, dass das gerade "nicht" geht

22.10.2025 www.prentke-romich.de 41



Welche didaktischen Materialien bietet PRD noch?

PRD Ideen

- Kostenloser Service von PRD
- Konkrete Vorschläge (z.B. Bastelideen, Pantomime) zum Einsatz verschiedener Kommunikationshilfen und zur aktiven Teilnahme von Nutzer:innen
- Inklusive Anleitung, Wortkarten, Youtube-Video

PRD Tauschbörse

Materialien, Ideen, Tipps und Tricks von Nutzer:innen oder deren Umfeld

Zielvokabularposter

- MetaTalk 5x9 und 6x11
- Passende Wortkarten auf der Homepage



Der Talker ist da - wie fangen wir an?

1



2



3





Wie bearbeite ich eine Taste?




- Nach Doppelklick auf die zu bearbeitende Taste öffnet sich der Tasten-Editor
- Taste kann nun bearbeitet werden (z.B. Foto, Bildtext, Funktion, Aufnahme)

MetaTalk Handbuch:



Wie erstelle ich eine Taste mit Symbol?

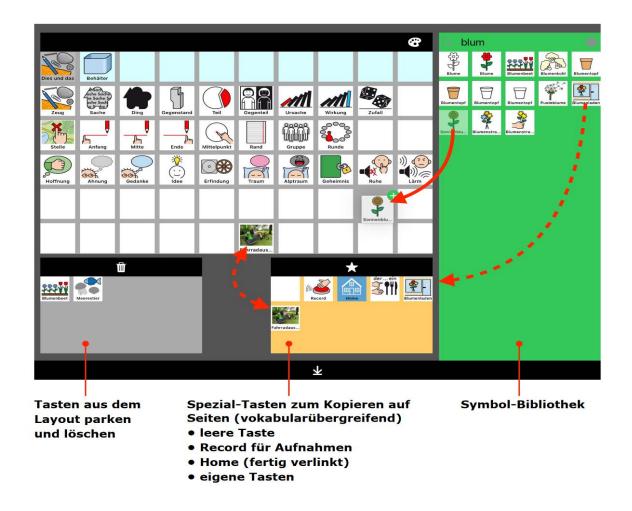

- Seite, die bearbeitet werden soll öffnen und den Seiten-Editor in der schwarzen Funktionsleiste auswählen
- Nicht benötigte Taste per Drag-and-Drop in den grauen Bereich ziehen
- Gewünschtes Symbol in der Bibliothek suchen
- Symbol per Drag-and-Drop an die gewünschte Position ziehen

MetaTalk Handbuch:



Wie erstelle ich eine Seite?



- Neue Seiten lassen sich entweder durch das Duplizieren einer vorhandenen Seite oder über die "+"-Taste hinzufügen
- WICHTIG: Seite mit einer Taste im Vokabular verknüpfen
- → Verknüpfung im Tasten-Editor erstellen

MetaTalk Handbuch:




Wie kann ich eine Seite importieren?

z.B. Leute-Seite von 5x9 zu 6x11

- 5x9 öffnen und in den Seitenmanager gehen
- Exportieren über Export-Seite(n) auswählen und auf Export tippen
- In Dateien des Vias sichern
- 6x11 öffnen, MetaTalk schließen und in die Dateien des Vias gehen
- Seiten-Export antippen, Symbol mit dem Pfeil der nach oben zeigt auswählen und auf MetaTalk tippen
- Dem roten Punkt in MetaTalk folgen
- Symbol mit der importierten Seite verknüpfen und Seite mit weißen Tasten auffüllen



Wie kann ich Sätze mit Symbolen abspeichern?

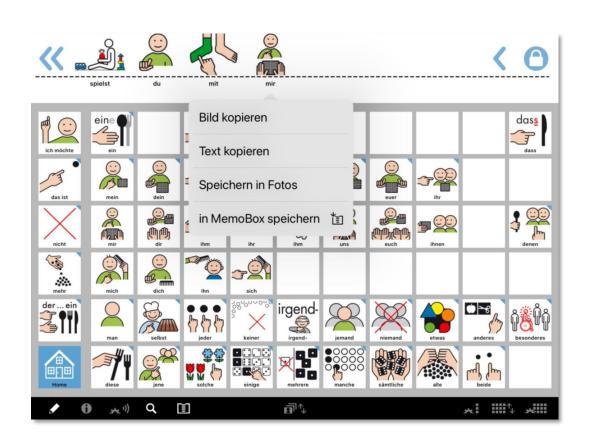

- Speichern von Sätzen zur späteren Verwendung
- → es können komplexe Aussagen in Ruhe vorbereitet und später

schnell aufgerufen und wiedergegeben werden

- Speichern erfolgt über langes Drücken auf die Sammelleiste
- → "In MemoBox speichern" auswählen



MetaTalk Handbuch:



Sammelleiste in Fotos Speichern






Wie kann didaktisches Material in MetaTalk erstellt werden

Suchergebnis in Fotos speichern






Wie kann ich den Zugriff auf Einstellungen verhindern?

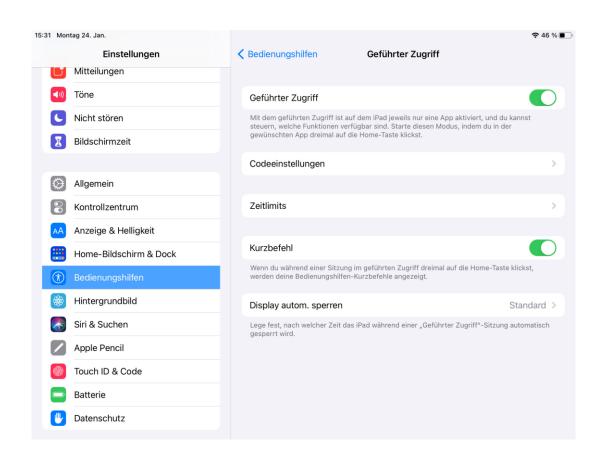

- Gelingt mit dem GEFÜHRTEN ZUGRIFF
- Aktivierung in allen Apps auf die gleiche Weise
- Ein- bzw. Ausschalten durch dreimaliges Tippen auf die obere Taste (Taste zum An-/Ausschalten)

Noch Fragen?

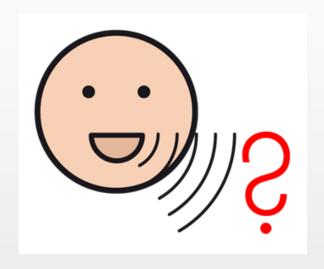



Folgt uns gerne auf Instagram und Facebook









Weiterführende Links

PRD-Ideen

https://www.prentke-romich.de/ideen-des-monats/

PRD-Tauschbörse

https://www.prentke-romich.de/prd-tauschboerse/

Video Anleitungen

https://www.prentke-romich.de/metatalk-videoanleitung/

Begleitmaterial zu MetaTalk

https://www.metacom-symbole.de/downloads/download_begleitmaterial_mtde.html

©METACOM-SYMBOLE Annette Kitzinger