

100059v1

Urheberrechte und Marken

©2026 Prentke Romich GmbH. Nachdruckrechte für nichtkommerzielle Zwecke zur klinischen oder persönlichen Nutzung werden unter Angabe des Urheberrechtsvermerks gewährt. Kommerzielle Nutzung ist untersagt; der Weiterverkauf ist nicht gestattet. Bei Fragen zu zulässigen Nutzungen wenden Sie sich bitte an die Prentke Romich GmbH.

Vereinigte Staaten

AAC Language Lab®, AAC Learning Journey®, Accent®, AeroSwitch®, AeroText™, ChatEditor™, ChatFusion™, ChatPoint™, ChatSMS®, ChatWrap®, Coaching Corner®, CoreScanner™, Dialogue® AAC, Empower®, Engage®, Essence®, Freedom Switch™, iShare®, iSharePRC®, iShareWFL®, iSurround®, LAMP™, LAMP Words for Life®, Look®, Minspeak®, NovaChat®, NuEye®, NuPoint®, NuVoice®, PASS™, Pixon®, PRC-Salttillo®, PRIO®, Realize Language™, Semantic Compaction®, Timocco-on-Accent™, TouchChat®, Unidad®, Unity®, Unity® AAC, VersaChat®, VersaEye®, VersaSpeaker®, VersaWrap®, Via®, VocabPC™, und Xtreme™ sind Warenzeichen von PRC-Salttillo.

Australien

AAC Learning Journey™, Accent™, ChatSMS®, Coaching Corner®, Dialogue™, Empower™, Engage™, LAMP Words for Life®, Liberator Rugged®, Minspeak™, Nova Chat®, NovaRugged®, Semantic Compaction®, TouchChat®, Unity™, VersaEye®, VersaSpeaker®, VersaWrap®, Via™

Kanada

AAC Language Lab™, AAC Learning Journey®, Accent™, Coaching Corner®, Dialogue® AAC, Empower®, Engage®, LAMP Words for Life®, Minspeak®, NovaChat®, PRC-Salttillo®, Semantic Compaction®, TouchChat®, Unity®, VersaEye®, VersaSpeaker®, VersaWrap®, Via®

Europäische Union

AAC Language Lab™, AAC Learning Journey®, Accent®, AeroSwitch™, Coaching Corner®, Dialogue™, Empower®, Engage®, LAMP Words for Life®, Look™, Minspeak®, Nova Chat®, PRC-Salttillo™, Semantic Compaction®, TouchChat®, Unity™, VersaEye®, VersaSpeaker®, VersaWrap®, Via®

Deutschland

Accent®, AeroSwitch™, ChatSMS™, Eloquence™, Empower®, Engage™, LoGoFoXX®, LAMP Words for Life™, Look™, Minspeak®, MultiFoXX®, NovaChat™, Quasselkiste™, RehaFoXX®, Via®, WORTSTRATEGIE®

Singapur

AAC Language Lab®, AAC Learning Journey®, Accent™, Coaching Corner™, Dialogue™, Empower™, Engage™, LAMP Words for Life®, Minspeak®, NovaChat®, PRC-Salttillo™, Semantic Compaction®, TouchChat®

Vereinigtes Königreich

AAC Coaching Corner®, AAC Language Lab®, AAC Learning Journey®, Accent®, AeroSwitch™, ChatSMS®, Coaching Corner™, Dialogue® AAC, EasyChat®, Empower®, Engage®, Essence®, iShare-PRC™, LAMP Words for Life®, Liberator® (logo), Liberator Rugged™, Libswitch™, Look™, Minspeak®, NovaChat®, NuPoint™, NuVoice™, Pixon®, PRC-Salttillo®, Semantic Compaction®, TouchChat®, Unidad®, Unity®, VersaEye®, VersaSpeaker®, VersaWrap®, Via®

Drittparteien

Acapela Group® und my-own-voice™ sind Marken der Acapela Group. Acapela Group, Copyright 2026. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung mit Genehmigung. Die Acapela-Text-to-Speech-Technologie und die in dieser Software enthaltenen synthetischen Stimmen werden dem Endnutzer kostenlos zur Verfügung gestellt, dürfen jedoch ausschließlich zu Kommunikationszwecken verwendet werden und dürfen nicht verkauft, kopiert oder anderweitig gewinnbringend genutzt werden.

AirDrop®, App Store®, Apple®, Apple Books®, FaceTime®, Guided Access®, iCloud®, iPad®, iPad Air®, iPad mini®, iPadOS®, iPad Pro®, iPhone®, iPod®, iTunes®, Lightning®, Mac®, Macintosh®, Safari®, Siri®, TouchID®, und TrueDepth® sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern und Regionen.

METACOM Symbole © Annette Kitzinger. Nutzungsvorbehalt gemäß § 44b Absatz 3 Satz 1 Urheberrechtsgesetz – Kein Text oder Data Mining.

Andere Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Haftungsausschluss: Diese Einführung ist keine Gebrauchsanweisung und dient ausschließlich zu Referenzzwecken.

Dokumentenversion

100059v1 – 26.06.2026

Bezieht sich auf Unity 60 Wortstrategie für Accent 800, Accent 1000, Accent 1400, Via Air, Via Mini, Via Nano und Via Pro.

INHALTSVERZEICHNIS

Urheberrechte und Marken.....	2
ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER UNITY 60 WORTSTRATEGIE	4
Willkommen bei Unity 60 Wortstrategie	4
AUFBAU DER UNITY 60 WORTSTRATEGIE	5
Die Startseite der Unity 60 Wortstrategie auf dem Accent	5
Die Startseite der Unity 60 Wortstrategie auf dem Via	6
Die Startseite	7
Themenleiste	7
Grammatikastasten.....	8
Wortfeldtasten.....	8
Funktionstasten.....	9
Beschreibung der Funktionstasten.....	9
Alles sprechen	9
Weitere Funktionen der Standard-Themenleiste anzeigen	9
Die Kategorien (Wortfelder)	10
Bildung der Nomen	11
Plural	11
Genitiv Singular und Dativ Plural auf dem Via	12
Genitiv Singular und Dativ Plural auf dem Accent	12
Bildung der Verben	13
Vergangenheit	14
Partizip Perfekt.....	14
Imperativ.....	14
Verbphrasen	15
Bildung der Adjektive.....	16
Steigerungsformen.....	17
Adverbien.....	18
Präpositionen	19
Konjunktionen	19
Pronomen	20
Personalpronomen.....	20
Possessivpronomen.....	20
Die übrigen Pronomen	21
Fragewörter.....	22
Artikel.....	23
Der bestimmte Artikel.....	23
Der unbestimmte Artikel.....	23
Zahlwörter.....	24
Die Taste TALKER.....	25
Die Taste ZAUBERER	26
Die Seiten KALENDER und UHR	27
Die Seite UHR.....	27
Die Seite KALENDER	27


Allgemeine Informationen über Unity 60 Wortstrategie

Willkommen bei Unity 60 Wortstrategie


Mit „Unity 60 Wortstrategie“ präsentieren wir Ihnen die aktuelle Version des bekannten MINSPEAK® Anwendungsprogramms „Quasselkiste 60“. Die Umbenennung der „Quasselkiste 60“ erfolgte im Rahmen der Integration dieses Vokabulars in die App „Unity AAC“. Vorher war die „Quasselkiste 60“ in der App „Eloquence“ enthalten. Weiterhin enthalten war die Quasselkiste 60 in den Kommunikationssoftwares „NuVoice“ und „Empower“, die auf den Accent-Kommunikationshilfen laufen. Auch dort heißt sie jetzt „Unity 60 Wortstrategie“.

2 Versionen: mit Metacom- und mit Minspeak-Symbolen

MINSPEAK®-Systeme nutzen beim Speichern von Wörtern das Konzept einer festen Bildertastatur. Dieses Konzept ist nicht an eine bestimmte Symbolsammlung gebunden. Deshalb bieten wir unsere bewährten MINSPEAK®-Vokabulare Unity 60 Wortstrategie (ehemals Quasselkiste 60) und Unity 84 Wortstrategie (ehemals Wortstrategie 84) sowohl mit MINSPEAK®- als auch mit Metacom-Symbolen an.

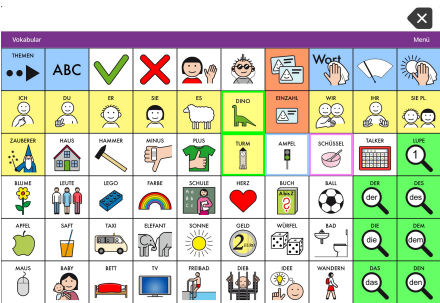

Startseite Unity 60 Wortstrategie mit Metacom-Symbolen

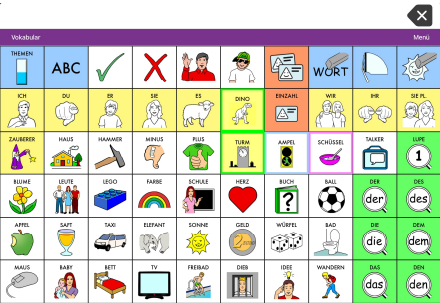

Startseite Unity 60 Wortstrategie mit Minspeak-Symbolen


Die in dieser Einführung gezeigten Beispiele verwenden die Variante der Unity 60 Wortstrategie mit Metacom-Symbolen aus der App „Unity AAC“. Die gemachten Angaben gelten jedoch gleichwohl für die Version mit MINSPEAK®-Symbolen und die entsprechenden Versionen auf dem Accent.

Um Änderungen an der Unity 60 Wortstrategie durchzuführen, lesen Sie bitte ebenfalls die Gebrauchsanweisung Ihrer Kommunikationshilfe durch.

Um auch später noch darin nachschlagen zu können, bewahren Sie diese Einweisung bitte auf.

Die Startseite der Unity 60 Wortstrategie auf dem Via

Nach dem Starten sehen Sie den Startbildschirm der Unity 60 Wortstrategie. Das Display ist in drei Bereiche unterteilt.

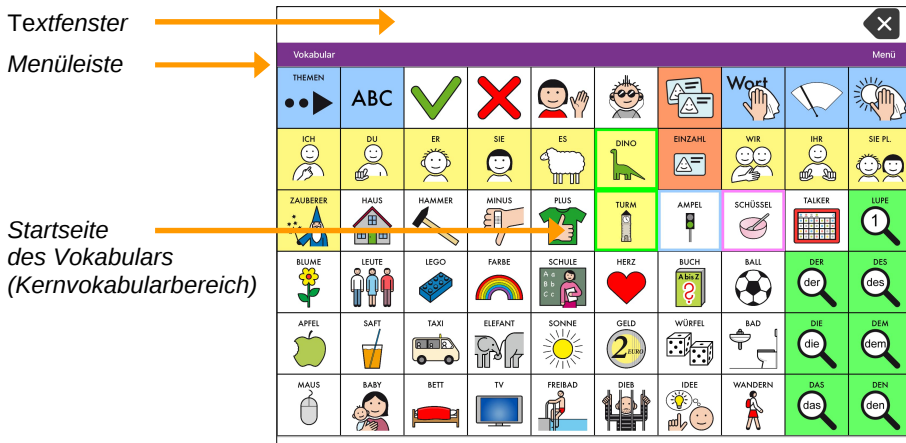


Oben befindet sich das Textfenster. Alle abgerufenen Mitteilungen erscheinen dort in Textform. Schriftgröße und Hintergrundfarbe können individuell eingestellt werden.

Unter dem Textfenster befindet sich die Menüleiste mit den Optionen „Vokabular“ und „Menü“.

Den Rest des Displays nehmen die 60 Tastenfelder des Vokabulars ein.


Die Startseite

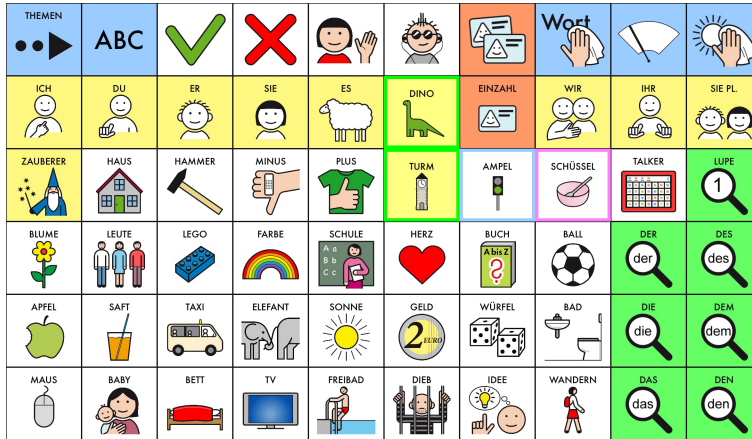

Die Startseite der Unity 60 Wortstrategie ist in drei Bereiche gegliedert:


1. Die Themenleiste mit Funktionstasten und schnellen Aussagen
2. Die Grammatiktafeln
3. Die Wortfeldtafeln

Themenleiste

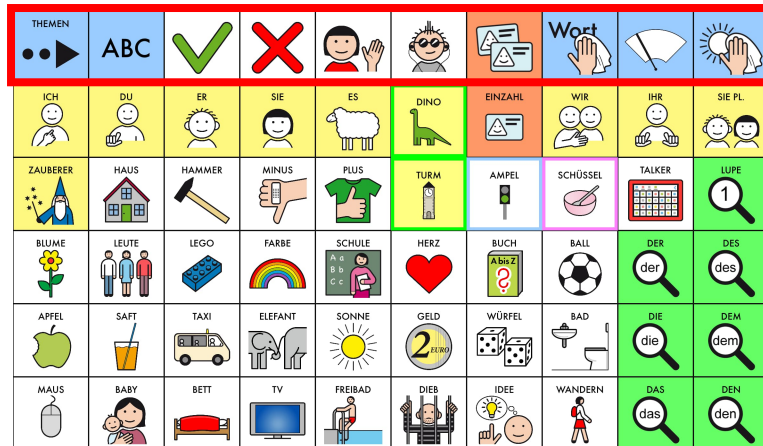

Die **Themenleiste** bietet Zugang zu wichtigen Wörtern des jeweils gewählten Wortfeldes. Auf der Startseite enthält die Themenleiste einige hochfrequente Mitteilungen, ein Feld zum Wechsel auf die Schriftseite und wichtige Löschfunktionen. Eine Übersicht, welche Tasten mit welchen Themenleisten verknüpft sind, befindet sich auf Seite 10.


Grammatiktasten

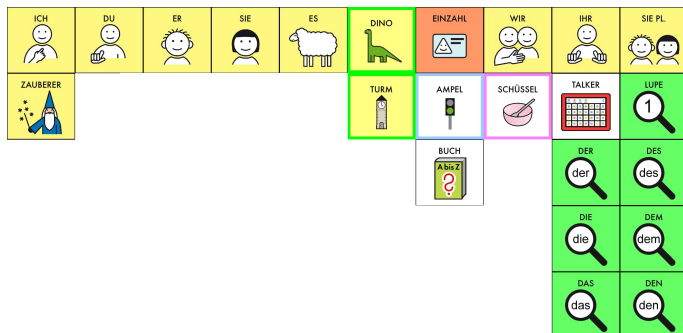

Die **Grammatiktasten** sind für die Bestimmung der jeweiligen Wortart zuständig. Die Wortarten sind farbmarkiert:

- Nomen orange
- Verben gelb
- Adjektive grün
- Personalpronomen..... lila
- Fragewörter..... hellblau
- Konjunktionen blauer Rahmen
- Adverbien..... grüner Rahmen

Wortfeldtasten

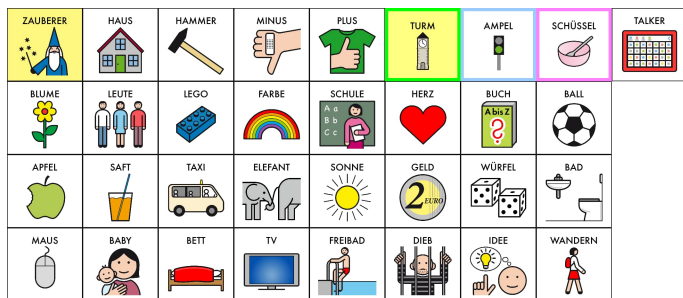

Die **Wortfeldtasten** sind für die Verknüpfung von Wortfeldern zuständig (siehe Seite 10).

Unter der Taste APFEL sind beispielsweise Wörter aus dem Bereich *Essen* erreichbar: „essen“ als Tätigkeitswort (gelb), „sauer“ als Eigenschaftswort (grün) sowie eine große Anzahl von Lebensmitteln.

Unter der Taste TAXI sind Wörter aus dem Bereich *Fahren* verknüpft: „fahren“ als Tätigkeitswort (gelb), „schnell“ als Eigenschaftswort (grün) sowie eine große Anzahl von Fahrzeugen.

Funktionstasten



Die blau hinterlegten **Funktionstasten** dienen der Steuerung des Talkers. Sie haben für die Bildung der Wortarten keine Bedeutung.

Beschreibung der Funktionstasten

Auf Startseite und Schriftseite befinden sich wichtige Funktionen.

	Öffnet die Schriftseite
	Löscht das zuletzt eingegebene Wort
	Löscht den gesamten Inhalt des Textfensters
	Löscht das zuletzt gewählte Symbol

Alles sprechen

Ich brauche meinen Talker



Bei Betätigung des Textfensters spricht der Talker alle Mitteilungen, die Sie seit dem letzten „Display löschen“ aufgerufen haben (ALLES SPRECHEN). Die Belegung ist abschaltbar.

Weitere Funktionen der Standard-Themenleiste anzeigen

Die Standard-Themenleiste enthält weitere Felder. Die Taste  ganz links zeigt die zweite Zeile der Themenleiste an:

	Schaltet die Sprachausgabe aus bzw. wieder ein
	Erhöht die Lautstärke der Sprachausgabe um eine Stufe
	Verringert die Lautstärke der Sprachausgabe um eine Stufe
	Ermöglicht das Suchen einer Mitteilung im Vokabular

Die Kategorien (Wortfelder)

Hier sehen Sie die Tasten der Startseite und die zugehörigen Kategorien (Wortfelder) und Themenleisten. Wenn Sie neue Wörter speichern, empfehlen wir, sie in der zugehörigen Kategorie unterzubringen, d.h. die Symbolsequenz sollte mit der Taste für die Kategorie beginnen.

IKON	ICH	DU	ER	SIE	ES	DINO	EINZAHL	WIR	IHR	SIE PL.
Wortfeld Themen- leiste										
	Phrasen ICH, Pronomen	Phrasen DU, Prono- men	Phrasen ER, Pronomen	Phrasen SIE, Pronomen	Phrasen ES, Pronomen	Adverbien	Pronomen	Phrasen WIR, Pronomen	Phrasen IHR, Pronomen	Phrasen SIE PL, Prono- men
IKON	ZAUBERER	HAUS	HAMMER	MINUS	PLUS	TURM	AMPEL	SCHÜSSEL	TALKER	LUPE
Wortfeld Themen- leiste										
	Sätze Start	Haus	Werken	Medizin	Kleidung	Adverbien Zeit Kalender	Stadt	Haushalt	Kommuni- kation	Zahlen
IKON	BLUME	LEUTE	LEGO	FARBE	SCHULE	HERZ	BUCH	BALL	DER	DES
Wortfeld Themen- leiste										
	Natur	Leute	Spielen	Farben	Schule	Gefühle	Fragewörter Lesen	Sport	–	–
IKON	APFEL	SAFT	TAXI	ELEFANT	SONNE	GELD	WÜRFEL	BAD	DIE	DEM
Wortfeld Themen- leiste										
	Essen	Trinken	Fahren	Tiere	Wetter	Geld	Formen	Pflege	–	–
IKON	MAUS	BABY	BETT	TV	FREIBAD	DIEB	IDEE	WANDERN	DAS	DEN
Wortfeld Themen- leiste										
	Computer	Familie	Möbel	Unter- haltung	Körper	Sprüche	–	–	–	–

Bildung der Nomen

Gruppe 1: Nomen, die auf der Taste EINZAHL  enden.



Gruppe 2: Nomen, die auf einer Bildtaste enden.



Gruppe 3: Nomen, die in der Themenleiste abgebildet werden.






Die Wörter werden direkt in der Themenleiste gewählt.



Plural

Die Plural-Form der Hauptwörter wird **nachträglich** mit der Taste MEHRZAHL  gebildet.

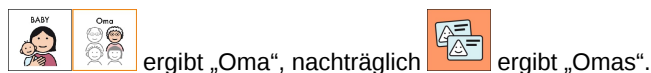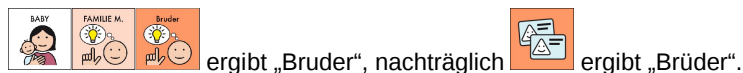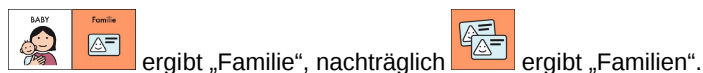

Genitiv Singular und Dativ Plural auf dem Accent

Sollten diese Formen erforderlich werden, kann die Themenleiste START durch die Themenleiste START2 ersetzt werden (siehe Funktion „Dialekte auswählen“ im

Handbuch zum Accent). Diese enthält die Tasten GENITIV  und DATIV



Genitiv Singular und Dativ Plural auf dem Via

Die Bildung der Formen Genitiv Singular und Dativ Plural erfolgt über die Tasten

GENITIV  und DATIV  auf der Seite THEMEN .

Die Formen Genitiv Singular und Dativ Plural werden **nachträglich** gebildet.

  ergibt „Fahrzeug“, nachträglich  ergibt „Fahrzeugs“.

  ergibt „Haus“, nachträglich  ergibt „Hauses“.

  ergibt „Fahrzeug“, nachträglich  ergibt „Fahrzeugen“.

  ergibt „Haus“, nachträglich  ergibt „Häusern“.

Bildung der Verben



Verben werden mit einer oder zwei Wortfeldtasten gebildet und enden auf einer der gelb markierten Personalpronomen-Tasten, der Taste ZAUBERER oder der Taste DINO.

Die Grundform des Verbs, der Infinitiv, wird mit der WIR-Taste  gebildet:

„spielen“



„gewinnen“



Die Beugung (Konjugation) des Verbs geschieht mittels der Personalpronomen-Tasten ICH, DU, ER, SIE, ES, WIR, IHR und SIE PL (siehe auch Personalpronomen, Seite 20).

Einzahl

(ich) „spiele“



(du) „spielst“



(er, sie, es) „spielt“



Mehrzahl

(wir) „spielen“



(ihr) „spielt“



(Sie) „spielen“




Vergangenheit

Im vereinfachten Wortschatz der Unity 60 Wortstrategie ist eine Bildung des Imperfekts nicht vorgesehen. Lediglich die Formen „waren“ (von „sein“) und „hatten“ (von „haben“) werden als eigenständige Wörter angeboten.

„waren“



„hatten“

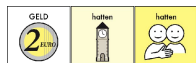


Partizip Perfekt

Das Partizip Perfekt des Verbs wird mit der Taste DINO  gebildet.

„gefahren“




„getroffen“

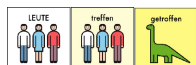


Imperativ

Die Befehlsform der Verben wird mit der Taste ZAUBERER  gebildet.

„komm“

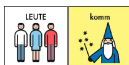


„mach“

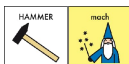

„fahr“



„freu“

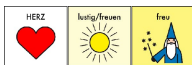

Verbphrasen

ich					ich war	ich bin		mir	mich
ich soll	ich wohne	ich mache	ich lasse	ich brauche	ich werde	ich darf	ich will	ich höre	mein
ich rieche	ich komme	ich spiele	ich male	ich lerne	ich möchte	ich lese	ich gebe	meiner	meines
ich esse	ich trinke	ich fahre	ich ziehe	ich scheine	ich habe	ich zähle	ich muss	meine	meinem
ich schreibe	ich mag	ich schlafe	ich sehe	ich kann	ich stehe	ich zeige	ich gehe	meins	meinen

Bildschirm nach Auswahl von ICH auf der Startseite: alle gelb markierten Tasten enthalten eine Verbphrase beginnend mit „ich...“

Die Pronomen ICH, DU, ER, SIE, ES, WIR, IHR und SIE PL sind mit allen Verben verknüpft, die mit nur einem Ikon gebildet werden. Mit lediglich 2 Tastenaktivierungen lässt sich so das Personalpronomen zusammen mit der gebeugten Verbform abrufen: ICH + TAXI = „ich fahre“.

„ich trinke“



„du fährst“




„sie geht“



Bildung der Adjektive

Die Adjektive werden mit einer oder zwei Wortfeldtasten gebildet und enden auf den grün markierten Tasten (auf diesen Tasten sind Lupen dargestellt). In der Unity 60 Wortstrategie steht die Grundform des Adjektivs zusätzlich auf den Tasten MINUS bzw. PLUS zur Verfügung. Dies erleichtert Umsteigern von der Quasselkiste 45 das Wiederfinden und Abrufen der Adjektive.

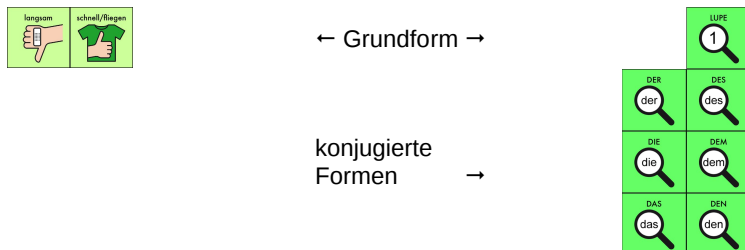

Adjektive sind – wenn möglich – als Gegensatzpaare gespeichert:

TAXI + PLUS = „schnell“
TAXI + MINUS = „langsam“

Die Grundform des Adjektivs wird mit der Taste LUPE  gebildet bzw. alternativ mit den Tasten MINUS  bzw. PLUS .



Die Konjugation des Adjektivs geschieht mit den Artikel-Tasten DER, DIE, DAS, DES, DEM und DEN.




Wenn Sie eine Taste gewählt haben, zu der ein Adjektiv gespeichert ist, verändern sich die Artikel-Tasten und zeigen in den Lupen nunmehr die jeweilige Endung des Adjektivs.



Steigerungsformen

Drücken Sie die Taste LUPE , um die Themenleiste LUPE sichtbar zu machen. Diese bietet die Möglichkeit der Bildung der Steigerungsformen Komparativ und Superlativ. Die Steigerungsform wird **nachträglich** gebildet.

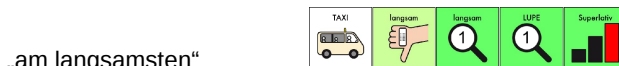

Weiterhin ist das Wort „besser“ (Komparativ des Wortes „gut“) als eigenständiges Adjektiv gespeichert:



Adverbien



Alle **zeitbestimmenden Adverbien** beginnen mit dem TURM . Sie sind mit einem grünen Rahmen farbmarkiert.

		gestern 	morgen 		jetzt 			
	bald 		nun 			manchmal 		
			schon 	heute 	nie 	vorher 		
	immer 	nachher 	oft 			wieder 		



Die **übrigen Adverbien** beginnen mit dem DINO und sind ebenfalls mit einem grünen Rahmen farbmarkiert.

allein 		fast 	weg 	da 	los 	nicht 	hier 		
raus 	auch 	nur 	mal 	so 	gern 	vielleicht 	draußen 	oben 	
rein 	drin 	hin 	noch 	gar 	her 	dran 	links 		rechts
egal 	zusammen 			nochmal 		sehr 		unten 	

Präpositionen



Die Präpositionen beginnen mit der Taste SCHÜSSEL .

Die meisten Präpositionen erhalten einen pinkfarbenen „BLOB“ als visuelle Eselsbrücke zur Verdeutlichung des jeweiligen Wortes.

		außer 			seit 	hinter 		statt 		
neben 	mit 	durch 	gegen 	an 	wegen 	zu 	von 			
	in 	nach 	auf 	um 	für 	zwischen 	über 			
vor 	bei 	unter 	aus 	ohne 	ab 	trozt 	bis 			

Konjunktionen



Die Konjunktionen fangen mit der Taste AMPEL an.

Sie sind mit einem hellblauen Rahmen farbmarkiert.

als 	ab 	suchen/je 	finden/desto 	dann 	wenn 		während 		
doch 	entweder 	oder 		und 		aber 			
	bevor 		trotzdem 	weil 	also 	sondern 			

Pronomen

Personalpronomen

Die **Personalpronomen** „ich“, „du“, „er“, „sie“, „es“ etc. werden gebildet, indem Sie zweimal auf die jeweilige Taste drücken. Die gebeugten Formen (mir / mich, dir / dich etc.) erhalten Sie ebenfalls nach Auswahl der Person.



„wir“



„mir“



„dich“



Possessivpronomen

Die Formen „mein“, „dein“, „sein“, „ihr“, „sein“, „unser“, „euer“ und „Ihr“ beginnen mit dem jeweiligen Personalpronomen und werden als deklinierbare Possessivpronomen mit der Taste LUPE




und den Artikeltasten gebildet und sind daher grün farbmarkiert.

Zum Beispiel:

„deiner“



„deine“

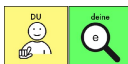

„deinem“



Die übrigen Pronomen

Alle übrigen Pronomen beginnen mit der Taste EINZAHL .

Die nicht-deklinierbaren Pronomen sind violett farbmarkiert, die deklinierbaren sind hellgrün farbmarkiert.

				letzte 	jede 	nichts 	alle 	dies 	
		andere 		selbst 		irgend 	einige 	dieser 	dieses 
bisschen 	etwas 					ein paar 		diese 	diesem 
				sich 	Ding 	man 	kein 		diesen 

Alle deklinierbaren Pronomen werden wie Adjektive behandelt und enden auf der

LUPE  bzw. den Artikeltasten.

Dazu gehören u.a. folgende Wörter:

„all“			
„alles“			
„kein“			
„keinem“			

Fragewörter



Die Fragewörter beginnen mit der Taste FRAGE und sind hellblau farbmarkiert.

wessen 		genug 	mehr 	wann 	wo 		wie 	welch
wer 	was 	warum 		Was möchtest? 			welcher 	welches
	wohin 				wie viel 		welche 	welchem
				wem 	wen 			welchen

Das Fragewort „welch“ ist deklinierbar („welche“, „welcher“, „welches“) und wird demnach mit der LUPE bzw. den Artikeltasten gebildet.

	LUPE
DER 	DES
DIE 	DEM
DAS 	DEN

„welch“



„welches“



Artikel


Der bestimmte Artikel

Die sechs möglichen Formen des bestimmten Artikels erhalten Sie direkt über die Artikelkasten, die auch als Endungstasten für deklinierbare Adjektive und Pronomen vorgesehen sind.



Der unbestimmte Artikel

Der unbestimmte Artikel „ein“ ist unter der Taste LUPE  gespeichert und wird mit den Artikelkasten dekliniert.

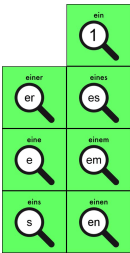

„ein“



„einer“



„eines“



Zahlwörter

Die Zahlwörter sind auf der Zahlenseite **123** untergebracht, die über die Schriftseite **ABC** erreichbar ist. Sie werden als Zahl (z.B. „1“, „2“, „3“ etc.) ausgegeben.

	ABC	:	x	-	+	=	Wort		B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
q	w	e	r	t	z	u	i	o	p
a	s	d	f	g	h	j	k	l	ß
y	x	c	v	b	n	m	ö	ä	ü
		!	?	(leer)		,	.	-	

Die Zahlen von 1 bis 10 als Ordinalzahlen („erster“, „zweiter“, „dritter“ etc.) beginnen mit der Taste LUPE . Sie können mit den Artikeltasten dekliniert werden.

erst	zweit	dritt	viert	fünft	sechst	siebt	acht	neunt	zehnt
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

„erster“

erst
1.

erster

„zweite“

zweit
2.

zweite

„drittens“

dritt
3.

drittens

Die Taste TALKER

Redewendungen, die wir im Alltag häufig benutzen, sind mit der Taste TALKER



beginnend gespeichert.

Hier einige Beispiele:

„Herzlich willkommen!“



„Prost!“



„Guten Appetit!“



„danke“



Die Taste ZAUBERER

Sätze zur schnellen Information sind mit der Taste ZAUBERER  beginnend gespeichert.

Hier einige Beispiele:

„Mir ist langweilig!“



„Ich muss mal!“



„Komm mal bitte!“



„Ich habe Durst!“



Wollen Sie weitere Sätze hinzufügen, lassen Sie diese am besten ebenfalls mit der Taste ZAUBERER beginnen, um die Struktur beizubehalten.

Die Seiten KALENDER und UHR



Die Seiten KALENDER und UHR sind über die Taste TURM und die zugehörige Themenleiste ZEIT erreichbar.



Die Seite UHR

		1	2	3	4	5	6	7	
		8	9	10	11	12	13	14	
		15	16	17	18	19	20	21	
		22	23	24	25	26	27	28	
		29	30						

Die Seite enthält zum Benennen von Uhrzeiten benötigte Zahlen und Begriffe.

Die Seite KALENDER

			1	2	3	4	5	6	7
			8	9	10	11	12	13	14
			15	16	17	18	19	20	21
			22	23	24	25	26	27	28
			29	30	31	2020	2021	2022	2023

Die Seite enthält zum Benennen von Tag und Datum benötigte Zahlen und Begriffe. Mit Hilfe der Taste „Heute ist“ wird das aktuelle Datum und die jeweilige Uhrzeit angesagt.



prentke romich deutschland
weil jede:r was zu sagen hat!

Prentke Romich GmbH

Karthäuserstr. 3
D-34117 Kassel
Tel. (05 61) 7 85 59-0
Fax (05 61) 7 85 59-29
E-Mail info@prentke-romich.de
Web www.prentke-romich.de