



Einführung in die

Unity

Wortschatz-App



DOC100570v100

prentke romich deutschland
weil jede:r was zu sagen hat!

Urheberrechte und Marken

Vereinigte Staaten

©2026 PRC-Saltlito. Nachdruckrechte für nichtkommerzielle Zwecke zur klinischen oder persönlichen Nutzung werden unter Angabe des Urheberrechtsvermerks gewährt. Kommerzielle Nutzung ist untersagt; der Weiterverkauf ist nicht gestattet. Bei Fragen zu zulässigen Nutzungen wenden Sie sich bitte an PRC-Saltlito.

AAC Language Lab®, AAC Learning Journey®, Accent®, AeroSwitch®, AeroText™, ChatEditor™, ChatFusion™, ChatPoint™, ChatSMS®, ChatWrap®, Coaching Corner®, CoreScanner™, Dialogue® AAC, Empower®, Engage®, Essence®, Freedom Switch™, iShare®, iSharePRC®, iShareWFL®, iSurround®, LAMP™, LAMP Words for Life®, Look®, Minspeak®, NovaChat®, NuEye®, NuPoint®, NuVoice®, PASS™, Pixon®, PRC-Saltlito®, PRIO®, Realize Language™, Semantic Compaction®, Timocco-on-Accent™, TouchChat®, Unidad®, Unity®, Unity® AAC, VersaChat®, VersaEye®, VersaSpeaker®, VersaWrap®, Via®, VocabPC™, und Xtreme™ sind Warenzeichen von PRC-Saltlito.

Australien

AAC Learning Journey™, Accent™, ChatSMS®, Coaching Corner®, Dialogue™, Empower™, Engage™, LAMP Words for Life®, Liberator Rugged®, Minspeak™, Nova Chat®, NovaRugged®, Semantic Compaction®, TouchChat®, Unity™, VersaEye®, VersaSpeaker®, VersaWrap®, Via™

Kanada

AAC Language Lab™, AAC Learning Journey®, Accent™, Coaching Corner®, Dialogue® AAC, Empower®, Engage®, LAMP Words for Life®, Minspeak®, NovaChat®, PRC-Saltlito®, Semantic Compaction®, TouchChat®, Unity®, VersaEye®, VersaSpeaker®, VersaWrap®, Via®

Europäische Union

AAC Language Lab™, AAC Learning Journey®, Accent®, AeroSwitch™, Coaching Corner®, Dialogue™, Empower®, Engage®, LAMP Words for Life®, Look™, Minspeak®, Nova Chat®, PRC-Saltlito™, Semantic Compaction®, TouchChat®, Unity™, VersaEye®, VersaSpeaker®, VersaWrap®, Via®

Deutschland

Accent®, AeroSwitch™, ChatSMS™, Eloquence™, Empower®, Engage™, LoGoFoXX®, LAMP Words for Life™, Look™, Minspeak®, MultiFoXX®, NovaChat™, Quasselkiste™, RehaFoXX®, Via®, WORTSTRATEGIE®

Singapur

AAC Language Lab®, AAC Learning Journey®, Accent™, Coaching Corner™, Dialogue™, Empower™, Engage™, LAMP Words for Life®, Minspeak®, NovaChat®, PRC-Saltlito™, Semantic Compaction®, TouchChat®

Vereinigtes Königreich

AAC Coaching Corner®, AAC Language Lab®, AAC Learning Journey®, Accent®, AeroSwitch™, ChatSMS®, Coaching Corner™, Dialogue® AAC, EasyChat®, Empower®, Engage®, Essence®, iShare-PRC™, LAMP Words for Life®, Liberator® (logo), Liberator Rugged™, Libswitch™, Look™, Minspeak®, NovaChat®, NuPoint™, NuVoice™, Pixon®, PRC-Saltlito®, Semantic Compaction®, TouchChat®, Unidad®, Unity®, VersaEye®, VersaSpeaker®, VersaWrap®, Via®

Drittparteien

Acapela Group® und my-own-voice™ sind Marken der Acapela Group. Acapela Group, Copyright 2026. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung mit Genehmigung. Die Acapela-Text-to-Speech-Technologie und die in dieser Software enthaltenen synthetischen Stimmen werden dem Endnutzer kostenlos zur Verfügung gestellt, dürfen jedoch ausschließlich zur Kommunikationszwecken verwendet werden und dürfen nicht verkauft, kopiert oder anderweitig gewinnbringend genutzt werden.

AirDrop®, App Store®, Apple®, Apple Books®, FaceTime®, Guided Access®, iCloud®, iPad®, iPad Air®, iPad mini®, iPadOS®, iPad Pro®, iPhone®, iPod®, iTunes®, Lightning®, Mac®, Macintosh®, Safari®, Siri®, TouchID®, und TrueDepth® sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern und Regionen.

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und werden von PRC-Saltlito unter Lizenz verwendet.

CAVIWIPES™ ist eine Marke der Metrex Research LLC.

Dropbox® ist eine eingetragene Marke von Dropbox, Inc.

Google™, Google Docs™, Google Drive™, Google Play™, Android™, Chromebook™, Gmail™, und YouTube™ sind Marken von Google Inc.

Intel®, die Intel logo, Intel® Core™, und Celeron® sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

iOS® ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

Ivona wird geliefert von ReadSpeaker.

Mac® ist eine in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragene Marke von Apple Inc.

Microsoft® und Windows® sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

My QuickChat™ ist urheberrechtlich geschützt von Talk To Me Technologies.

Netflix® ist eine Marke von Netflix, Inc.

PCS® ist eine Marke der Tobii Dynavox LLC. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung mit Genehmigung.

Samsung® und Galaxy Tab® sind eingetragene Marken von Samsung Electronics America, Inc.

Die in diesem Werk verwendeten Symbole sind Eigentum von n2y, LLC. Verwendung mit Genehmigung unter Lizenz. © 2026.

TIK TOK ist eine Marke von Bytedance Ltd.

Velcro® ist eine eingetragene Marke von Velcro BVBA.

VocalID™ ist eine Marke von VocalID, Inc.

Die Voice Keeper- und Almagu-Stimmen sind geistiges Eigentum von Almagu.

WhatsApp ist eine Marke von WHATSAPP LLC.

Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

Winde® ist eine eingetragene Marke von S. C. Johnson & Son, Inc.

WordPower® ist eine Marke von Inman Innovations, Inc. © 2001–2026; Alle Rechte vorbehalten. Verwendung mit Genehmigung.

Andere Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Dokumentenversion

DOC100570v100 - 05.06.2026

Inhaltsverzeichnis

- Sicherheits- und Compliance-Informationen 8
 - Aktuelle Softwareversion8
- Sicherheitsrichtlinien 9
- Erste Schritte mit Unity AAC16
 - Schritt 1: Stimmen Sie der Software-Lizenzvereinbarung zu16
 - Schritt 2: Wählen Sie eine Stimme16
 - Schritt 3: Automatische Datensicherung für benutzerdefinierte Dateien einrichten16
- Vokabular wählen18
- Unity AAC Menü-Übersicht19
- Wortsuche21
- Software-Updates22
- Unity AAC-Einstellungen – Übersicht23
 - Profile23
 - Feedback23
 - Anzeigeformat24
 - Menüsperre26
 - Sprache26
 - Textfenster (TF)27
 - Maximiertes Textfenster29
 - KI-Funktionen29
 - Sprachausgabe30
 - Neigung30
 - Sprachdatenaufzeichnung31
 - Tasten31
 - Vorhersage33
 - Whiteboard34
 - Kopfsteuerung34
 - Soziale Netzwerke34
 - Verstärker35
 - Scanning35
- Kopfsteuerung einrichten36
 - Kopfsteuerung ein- oder ausschalten36
 - Den Benutzer positionieren36
 - Kopfsteuerungseinstellungen37
 - Tipps zur Kopfsteuerung43
- Tastenscanning einrichten45

Einen oder zwei Tasten einrichten	45
Unity AAC-Scaneinstellungen	47
Stimmen und Ausspracheregeln	51
Eine Stimme hinzufügen oder ersetzen	51
Spracheinstellungen anpassen	51
Erstellen Ihrer Stimme mit The Voice Keeper	53
Ihre VocaliD™-Stimme einrichten	55
Eine Apple Personal Voice erstellen	56
Acapela-Stimmenlimit	57
Ausspracheregeln für Wörter	57
Sprachpräferenzen einstellen	59
Ausrichtungseinstellungen festlegen	60
Bildschirmausrichtung einstellen	60
iPhone-Bildschirmausrichtung	60
Zugriff auf Bearbeitungsmenüs einschränken	62
Mit Vokabulardateien arbeiten.....	63
Eine Vokabulardatei wählen.....	63
Eine Vokabulardatei kopieren	64
Eine neue leere Vokabulardatei erstellen	64
Eine benutzerdefinierte Vokabulardatei umbenennen.....	65
Eine benutzerdefinierte Vokabulardatei löschen.....	65
Die Sprache einer Vokabulardatei ändern	66
Automatische Datensicherungen für benutzerdefinierte Dateien	67
Automatische Sicherung einrichten	68
Eine benutzerdefinierte Datei wiederherstellen	69
Vokabulardateien übertragen oder sichern	70
Eine Datei mit AirDrop®, Google Drive™ oder per E-Mail exportieren	70
Eine Vokabulardatei zu Dropbox® exportieren	71
Eine Vokabulardatei zu iTunes® exportieren	71
Vokabulardateien von Ihrem Gerät auf ein USB-Laufwerk exportieren	72
Eine Datei von einem USB-Laufwerk auf Ihr Gerät importieren	73
Mehrere Vokabulardateien von einem USB-Laufwerk auf Ihr Gerät importieren	73
Sprachen hinzufügen oder entfernen.....	75
Wählen Sie Ihre Stimme für die betreffende Sprache/Region	76
Eine Sprache entfernen	77
Textfenster	79
Textgröße im Textfenster vergrößern	79

Eine Textfenster-Aktion zum Vergrößern des Textes erstellen.....	79
Die Anzahl der Zeilen für Text im Textfenster erhöhen	79
Textfenster nach dem Sprechen automatisch löschen	80
Gesprochenes Wort hervorheben.....	80
Gesprochene Wörter bei Telefonaten/in FaceTime hervorheben.....	81
Mit einer Kombination aus Stimmen/Sprachen sprechen	82
Wortvorhersage	83
Art der Vorhersage festlegen	83
Fügen Sie gelernte Wörter zur Vorhersagebibliothek hinzu	84
Gelernte Wörter aus dem Wortvorhersage-Lexikon löschen	85
Textbausteinerweiterung	86
Fokuswörter	87
Fokuswörter-Fenster	87
Wörter im Vokabular anzeigen	90
Neue Wortliste erstellen.....	91
Ein Wort aus einer Liste löschen	92
Eine Liste speichern	93
Schaltflächengrößen vergrößern.....	94
Bearbeiten von Tasten	95
Editiermodus	95
Tastenbeschriftung oder -mitteilung ändern	95
Aussprache für eine Tastenmitteilung bearbeiten.....	96
Sonderzeichen einfügen	96
Tastenbild ändern	97
Nach Symbolen suchen	97
Statische Symbole für ein einheitliches Erscheinungsbild verwenden	99
Tastenvorgaben ändern	99
Tastengröße ändern	99
Eine Tastenlayout ändern.....	99
Die Grundfarben einer Taste ändern	100
Die Farben auf einer Taste anpassen	100
Tastenrandgröße erhöhen	103
Tasten-Einstellungen ändern	104
Zeiteinstellungen für Tasten.....	104
Startseiten-Labels ein-/ausblenden	105
Tastenfunktion	105
Verfügbare Tastenfunktionen	105

Tastenaktion hinzufügen oder ändern	114
Tastenfunktionen neu anordnen oder entfernen	115
Taste zum Speichern des Textfensterinhalts erstellen	115
Eine Taste zum Aufnehmen eines Fotos erstellen	116
Eine Taste zur Wiedergabe eines Videos erstellen	117
Eine Taste zum Abspielen eines YouTube™-Videos erstellen	118
Eine Taste zum Öffnen einer App erstellen	119
So suchen Sie nach der App:	120
Eine Rechnertaste erstellen	121
Eine Lautstärkeregler-Taste erstellen.....	121
Eine Batteriestand-Taste erstellen	122
Eine Datums-/Zeittaste erstellen	122
Eine Taste zum Öffnen einer benutzerdefinierten Vokabulardatei erstellen	123
Eine Taste zur Verknüpfung mit einer neuen Seite erstellen	123
Tasten verschieben und ausblenden	125
Eine Taste verschieben	125
Eine Taste ausblenden.....	126
Eine Taste kopieren und einfügen.....	126
Kopieren und dieselbe Taste verwenden	127
Eine Tastenvorgabe kopieren/einfügen	127
Seiten	128
Eine Seite bearbeiten	128
Eine Seite duplizieren	128
Eine weitere Seite bearbeiten	129
Eine neue leere Seite erstellen.....	129
Eine Seite als Schriftseite festlegen	130
Eine neue Seite anhand einer Navigationsaktion erstellen.....	130
Eine Seite aus einer anderen Vokabulardatei kopieren	131
Einer Seite eine Geste hinzufügen.....	131
Hintergrundfarbe überschreiben	132
Eine Verbseite hinzufügen.....	133
Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Seite, indem Sie Wörter manuell hinzufügen	135
Spezialseite erstellen	138
Startseite ändern.....	138
Die Seite als Vorlage speichern	138
Eine neue Seite anhand einer Vorlage hinzufügen	139
Die Startseite kann nicht gelöscht werden.....	140

Whiteboard-Seiten	141
Eine Whiteboard-Seite erstellen	141
Whiteboard-Werkzeuge	142
Whiteboard-Einstellungen anpassen	143
KI-Funktionen	144
KI zum Bearbeiten von Mitteilungen im Textfenster verwenden	144
KI nutzen, um Mitteilungen im Textfenster zu übersetzen	145
KI zur Erzeugung von Bildern für Tasten verwenden	147
Nutzen Sie KI, um Bilder für Schaltflächen zu generieren	148
Sprachentwicklung mithilfe der Sprachdatenaufzeichnung verfolgen	150
Verwendung von Realize Language	150
Sprachdatenaufzeichnung aktivieren	151
Privatsphärenpasswort erstellen	152
Ihr Privatsphärenpasswort ändern oder entfernen	152
Vergessenes oder verloren gegangenes Privatsphärenpasswort	154
Daten zu Realize Language hochladen	154
Nutzungsdaten löschen	155
Anmeldedaten für das Realize Language-Konto löschen	156
Aufgezeichnete Sprachdaten manuell exportieren	157
Telefongespräche – Telefonie	158
Soziale Netzwerke	159
Acapela Sprach-Smileys	160
Ton hinzufügen	160
Stimm-Smiley finden	160
Beispiel: Smiley-Gesicht und Lachen hinzufügen	160
Probleme und Lösungen	162
Probleme mit der App-Performance	162
Vokabulardateien (.ce) werden in der falschen iOS-App geöffnet	162
Für Schulen/Organisationen	165
Konformitäts-Informationen	166
Internationale Kontaktinformationen	169
Softwarelizenzvereinbarung für die iOS-App:	170

Sicherheits- und Compliance-Informationen

Unity® AAC wurde für Personen entwickelt, die einen Schlaganfall erlitten haben, oder an Autismus, Downsyndrom, ALS, Apraxie, Schlaganfall oder anderen Erkrankungen leiden, die ihre Fähigkeit zum natürlichen Sprechen beeinträchtigen.

Wenn Sie Hilfe mit der App benötigen oder Probleme auftreten, kontaktieren Sie uns bitte.

Allgemeine Fragen: info@prentke-romich.de

Fragen an den Technischen Support: info@prentke-romich.de

Schulungsmöglichkeiten: <https://www.prentke-romich.de/online-schulungen/>

Aktuelle Softwareversion

Dieses Benutzerhandbuch entspricht immer der aktuellen Softwareversion. Wenn Sie nicht die aktuelle Version verwenden, enthält Ihre App möglicherweise nicht alle im Handbuch beschriebenen Funktionen.

Es ist hilfreich, die verwendete App-Version zu kennen, insbesondere wenn Sie mit dem technischen Support sprechen. So finden Sie die Versionsnummer Ihrer Software:

1. Wählen Sie Vokabular.
2. Wählen Sie Vokabular auswählen.
3. Die Versionsnummer wird am unteren Bildschirmrand angezeigt.

Eine Anleitung zum Aktualisieren der App auf die neueste Version finden Sie unter [Software-Updates](#).

Sicherheitsrichtlinien

Die folgenden Sicherheitsrichtlinien gelten nur für Geräte, die von PRC-Salttillo erworben wurden.

Gerätesicherheit

Notfälle

- Dieses Gerät ist nicht als Notrufgerät oder alleinige Kommunikationshilfe gedacht.

Modifikationen

- Versuchen Sie nicht, das Gerät, das Modul oder irgendwelche Zubehörteile zu modifizieren. Modifikationen könnten eine Sicherheitsgefahr darstellen und die Ausrüstung außer Betrieb setzen.

Schadstoffe

- Um die Aufnahme von Bakterien, Staub und Schmutz zu verhindern, sollten Sie dem Nutzer nicht erlauben, auf dem Produkt zu kauen.

Reinigung, Wartung und Wartung

- Warten oder reinigen Sie das Gerät während der Nutzung nicht. Trennen Sie das Ladegerät und schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus.
- Wenn das Gerät, das Modul oder ein Zubehör beschädigt ist, rufen Sie den Service um Unterstützung an. Versuchen Sie nicht, Reparaturen selbst durchzuführen.

Zubehör

- Verwenden Sie kein Zubehör, abnehmbare Teile oder Materialien, die nicht im Handbuch beschrieben sind.
- Verwenden Sie kein Zubehör, abnehmbare Teile oder Materialien auf andere Weise als im Handbuch beschrieben.

Montage und Positionierung

- Eine qualifizierte Person sollte die Positionierung analysieren, um wiederholte Belastungsverletzungen des Nutzers zu vermeiden.
- Eine qualifizierte Person sollte alle Halterungen, einschließlich Tastenhalterungen, installieren und einstellen. Das Versäumnis, das Montagesystem gemäß den Anweisungen des Herstellers zu installieren, kann zu einer Verletzung des Benutzers führen.
- Stellen Sie das Gerät nicht mit einem Eye-Tracking- oder Head Tracking-Modul an, wo es schwer zu bedienen oder vom Ladegerät zu trennen ist.

Sehen und Hören

- Der Kommunikationspartner sollte sicherstellen, dass der Nutzer häufig Pausen einlegt, um Augenbelastung zu vermeiden.
- Sprechen Sie ggf. mit Ihrem Augenarzt über die Positionierung des Geräts für den Nutzer.
- Übermäßige Lautstärke oder Schalldruck bei der Verwendung von Kopfhörern kann über längere Zeit zu Hörverlust führen. Stellen Sie die Lautstärke auf einen niedrigen Pegel und erhöhen Sie sie nur so weit, dass der Benutzer/die Benutzerin bequem hören kann.

Anschlüsse und Steckverbinder

- Halten Sie Anschlüsse und Verbindungen sauber, um die Lebensdauer des Geräts zu maximieren. Verschmutzte Stecker übertragen Verunreinigungen auf die Buchsen des Geräts und können die Leistung beeinträchtigen.
- Wenn das Gerät Wasser ausgesetzt war, muss jeder USB-Anschluss vollständig trocken sein, bevor ein USB-Kabel eingesetzt wird. Um Feuchtigkeit aus den USB-Anschlüssen zu entfernen, schütteln Sie das Gerät mehrmals, wobei jeder USB-Anschluss nach unten zeigt, und wischen Sie das Gerät dann mit einem Mikrofasertuch trocken. Dann sollten Sie den USB-Portbereich noch einmal überprüfen. Wenn noch Feuchtigkeit in einem USB-Anschluss sichtbar ist, wiederholen Sie das Schütteln und Trocknen.
- Versuchen Sie nicht, einen Stecker in eine Buchse zu zwingen. Achten Sie darauf, den Stecker in die richtige Buchse einzustecken und den Stecker so zu drehen, dass er der Ausrichtung der Buchse entspricht.

Kleine Teile, Schnüre, Kabel und Bänder

- Schnüre, Kabel und Gurte sind potenzielle Gefahren für Verheddern oder Strangulation. Beachten Sie dies, bevor Sie diese Gegenstände an Gerätebenutzer abgeben.
- Überprüfen Sie regelmäßig Leitungen, Kabel und Stecker visuell auf Schäden oder Verschleiß, besonders wenn sie zusätzlicher Belastung ausgesetzt sind. Leitungen und Kabel können durch starke Nutzung oder mit dem Alter ausgefranst oder beschädigt werden. Zum Beispiel könnte ein ausgefranstes Kabel dazu führen, dass ein Batterieladegerät/Netzteil einen Kurzschluss verursacht und eine Gefahr für den Nutzer darstellt. Wenn eine Leitung, Kabel oder Stecker beschädigt oder abgenutzt ist, rufen Sie den Service für einen Austausch an.
- Wenn Sie eine Leitung oder ein Kabel abziehen, greifen Sie den Stecker statt des Kabels selbst, um Schäden oder Abnutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie USB-Kabel zum Laden oder Übertragen von Vokabulardateien gemäß den Anweisungen im Handbuch.
- Wenn der Ständer entfernt wird, stellt er eine potenzielle Augengefahr dar. Beim Schließen des Ständers besteht Klemmgefahr für Finger.
- Beim Hantieren mit dem Stylus besteht eine potenzielle Gefahr für Augenverletzungen.
- Wenn Sie ein Head-Tracking- oder Eye-Tracking-Modul montieren, können lose Schrauben eine Erstickungsgefahr darstellen.
- Kleine Teile und lose Adapter können eine Erstickungs- oder eine andere Gefahr darstellen.

Schäden

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Bildschirm Sprünge hat oder zerbrochen ist.
- Verwenden Sie kein Eye-Tracking- oder Head Tracking-Modul, wenn das Kameraobjektiv gerissen oder beschädigt ist.

Interferenz

- Wenn Sie dieses Gerät in einer medizinischen Umgebung betreiben, verwenden Sie es nicht mit einem Produkt, das nicht medizinisch zugelassen ist. Befolgen Sie alle Regeln für die angemessene Nutzung von drahtlosen Geräten.
- Verwenden Sie das Gerät oder Modul nicht in der Nähe von RF-/RFID-Strahlungsquellen, da Sie sonst auf Störungen stoßen könnten. Entfernen Sie sich, wenn möglich, von der Quelle der Störung.

Feuchtigkeit

- Wenn das Gerät Wasser ausgesetzt war, muss jeder USB-Anschluss vollständig trocken sein, bevor ein USB-Kabel eingesetzt wird. Um Feuchtigkeit aus den USB-Anschlüssen zu entfernen, schütteln Sie das Gerät mehrmals, wobei jeder USB-Anschluss nach unten zeigt, und wischen Sie das Gerät dann mit einem Mikrofasertuch trocken. Dann sollten Sie den USB-Portbereich noch einmal überprüfen. Wenn noch Feuchtigkeit in einem USB-Anschluss sichtbar ist, wiederholen Sie das Schütteln und Trocknen.
- Das Gerät ist für den Einsatz in normalen Kommunikationssituationen gedacht. Es ist nicht wasserdicht. Sprühen oder spritzen Sie keine Flüssigkeit direkt auf das Gerät und seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie es in der Nähe von Wasser verwenden. Wie bei den meisten elektronischen Geräten sollten Sie das Gerät niemals benutzen, wenn Sie tatsächlich im Wasser sind (zum Beispiel in einem Pool oder Bad).

Hitze

- Stellen Sie das Gerät nicht in ein Gerät wie eine Mikrowelle oder einen Ofen, in der Nähe einer offenen Flamme oder auf oder in der Nähe einer Wärmequelle wie einem Herd oder Heizlüfter.
- Lassen Sie das Gerät oder Modul nicht über längere Zeit in einem heißen Fahrzeug stehen.

Batterien und Laden

- Verwenden Sie nur das mit diesem Gerät gelieferte Batterieladegerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass es schwer zu bedienen oder vom Ladegerät zu trennen ist.
- Befolgen Sie beim Laden des Geräts immer die Anweisungen in diesem Handbuch.
- Stecken Sie kein Objekt in die Ladebuchse. Dies kann zu Schäden am Anschluss führen.
- Um elektrische Schocks und Schäden am Gerät zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nicht aufladen, solange es nass ist oder an einer Stelle, an der es nass werden könnte. Fassen Sie das Gerät, das Ladegerät oder die Kabel nicht mit nassen Händen an.
- Positionieren Sie das Gerät während des Ladens an einem sicheren, trockenen Ort. Laden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Halten Sie das Ladegerät vom Wasser fern und lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten darauf laufen.
- Wenn das Ladegerät oder das Ladekabel beschädigt ist, rufen Sie den Service für einen Austausch an.

Umwelt

- Bringen Sie das Gerät nicht in eine sauerstoffreiche Umgebung (Operationssaal, Sauerstoffzelt usw.).
- Verwenden Sie das System nicht in einer Umgebung, in der explosive oder brennbare Gase vorhanden sein könnten.

Die Oberfläche berühren

- Während das Gerät lädt, kann das Berühren der Oberfläche mit verletzter Haut eine Wunde verschlimmern.
- Während das Gerät lädt, sollten Hochrisikogruppen die Oberfläche nicht berühren, wenn die Gefahr besteht, die Haut zu verbrennen.

Implantierbare Medizinprodukte

Zwischen einem tragbaren drahtlosen Gerät und einem implantierten medizinischen Gerät wie einem Herzschrittmacher, implantiertem Herzblatt-Defibrillator, Vagusnervstimulator, Shunt oder Stent sollte mindestens 15 cm gehalten werden, um mögliche magnetische Störungen mit dem medizinischen Gerät zu vermeiden. Eine Person, die ein implantierbares medizinisches Gerät besitzt:

- Das Gerät sollte immer mindestens 15 cm vom implantierbaren medizinischen Gerät entfernt gehalten werden;
- das Gerät nicht in einer Brusttasche zu führen;
- das Gerät von sich wegbewegen, wenn sie vermuten, dass es das implantierbare medizinische Gerät stört;
- Sie sollten die Anweisungen des Herstellers des implantierbaren Medizingeräts lesen und befolgen.
- Wenn Sie Fragen zur Verwendung des drahtlosen Geräts mit einem implantierbaren medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Software-/App-Sicherheit

- Die Software ist nicht als Notruf-App oder alleinige Kommunikationshilfe gedacht.
- Nutzen Sie die Software sicher beim Verfassen von SMS. Schreiben Sie nicht, während Sie eine andere Aufgabe oder Aktivität erledigen.
- Der Kommunikationspartner sollte sicherstellen, dass der Nutzer häufig Pausen einlegt, um Augenbelastung zu vermeiden.
- Konsultieren Sie ggf. Ihren Augenarzt, um das Gerät so zu positionieren, dass der Nutzer die Software einsehen kann.
- Beim Anpassen der Lautstärke in der Software kann eine übermäßige Lautstärke oder Schalldruck bei der Verwendung von Kopfhörern oder Kopfhörern über längere Zeit zu Hörverlust führen. Stellen Sie die Lautstärke auf einen niedrigen Pegel und erhöhen sie nur so weit, dass Sie es bequem hören können.
- Wenn die Software nicht mehr funktioniert, kontaktieren Sie die Serviceabteilung.

Eye-Tracking-Sicherheit

Die folgenden Sicherheitsrichtlinien gelten für Geräte mit einem angeschlossenen Eye-Tracking-Modul, das ausschließlich bei PRC-Salttillo gekauft wurde.

Ermüdung

- Während der Nutzer sich an das Eye-Tracking gewöhnt, machen Sie häufig Pausen, um die Augen auszuruhen und die Konzentration zu entspannen.
- Manche Menschen können eine gewisse Müdigkeit erleben (bedingt durch absichtliches Augenfokussieren und schwere Konzentration) oder sogar eine Trockenheit der Augen (durch selteneres Blinzeln), wenn sie sich an das Eye-Tracking gewöhnen. Wenn Sie Müdigkeit oder trockene Augen haben, fangen Sie langsam an und begrenzen Sie die Dauer Ihrer Eye-Tracking-Sitzungen auf Ihr Komfortniveau. Feuchtigkeitsspendende Augentropfen können helfen, Trockenheit zu bekämpfen.

Anfälle

- Manche Menschen können epileptische Anfälle haben, die durch Lichtblitze oder Muster ausgelöst werden. Dies kann passieren, wenn ihnen aufeinanderfolgende Bilder oder Videos präsentiert werden, selbst wenn sie noch nie einen Anfall hatten. Beobachten Sie die Person, die das System benutzt. Entfernen Sie die Person sofort aus dem System und konsultieren Sie einen Arzt, wenn sie folgende oder ähnliche Symptome zeigt: unwillkürliche Bewegungen, Desorientierung, Krampfanfälle, Bewusstseinsverlust oder verändertes Sehvermögen.

Infrarotemissionen

- Augenverfolgungssysteme verwenden Infrarot-(IR)-Technologie. Bestimmte medizinische Geräte sind anfällig für Störungen durch IR-Emissionen. Verwenden Sie das Eye-Tracking-System nicht in der Nähe solcher anfälligen medizinischen Geräte. Wenn Sie Fragen zur Anfälligkeit eines medizinischen Geräts haben, konsultieren Sie den Hersteller des Medizingeräts oder Ihren Gesundheitsdienstleister.
- Wenn Sie Fragen zur Anfälligkeit eines medizinischen Geräts für die Infrarottechnologie haben, die Teil Ihres Eye-Tracking-Systems ist, wenden Sie sich an den Hersteller des Medizingeräts oder Ihren Gesundheitsdienstleister.

Erste Schritte mit Unity AAC

Schritt 1: Stimmen Sie der Software-Lizenzvereinbarung zu

Wenn Sie die Unity AAC-App zum ersten Mal öffnen, werden Sie in einer Meldung aufgefordert, der Softwareanwendungs-Lizenzvereinbarung zuzustimmen.

1. Klicken Sie auf den Link, um die Vereinbarung anzuzeigen, und klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Vereinbarung zu akzeptieren.
2. Wählen Sie Weiter, um mit der Nutzung der App zu beginnen.

Schritt 2: Wählen Sie eine Stimme

1. Im Startmenü werden Sie aufgefordert, eine gewünschte Stimme auszuwählen.
2. Wählen Sie Weiter. Ein Fenster bietet Ihnen die Möglichkeit, automatische Sicherungskopien Ihrer benutzerdefinierten Vokabulardateien einzurichten.
3. Sie können jetzt automatische Datensicherung einrichten oder Überspringen auswählen.

Verwandte Themen:

- [Sprachen hinzufügen oder entfernen](#)
- [Stimmen und Ausspracheregeln](#)

Schritt 3: Automatische Datensicherung für benutzerdefinierte Dateien einrichten

Hinweis: Falls Sie diesen Schritt beim ersten Öffnen der App übersprungen haben, aber jetzt automatische Datensicherungen einrichten möchten, finden Sie die Anweisungen unter „Automatische Datensicherungen für benutzerdefinierte Dateien“.

Nachdem Sie der Softwareanwendungs-Lizenzvereinbarung zugestimmt und Ihre Sprache und Stimme eingestellt haben, wird ein Fenster Automatische Sicherung angezeigt.

Wählen Sie einen Cloud-Dienst aus, geben Sie einen Namen für Ihr Sicherungsverzeichnis im betreffenden Dienst ein und befolgen Sie die Anweisungen.

So stellen Sie eine gesicherte Datei wieder her:

Wenn eine Datei im Ordner für die automatische Sicherung gespeichert wird, wird hinter dem Dateinamen „Wiederherstellen“ angezeigt. Um eine benutzerdefinierte Datei in Ihrer Vokabularliste wiederherzustellen, wählen Sie Wiederherstellen.

Wenn die Datei in Ihrer Vokabularliste wiederhergestellt wird, wird im Verzeichnis für die automatische Datensicherung nach dem Dateinamen ein Häkchen anstelle von „Wiederherstellen“ angezeigt.

Stimme

1. Im Startmenü werden Sie aufgefordert, eine gewünschte Stimme auszuwählen.
2. Wählen Sie Weiter. Ein Fenster bietet Ihnen die Möglichkeit, automatische Sicherungskopien Ihrer benutzerdefinierten Vokabulardateien einzurichten.
3. Sie können jetzt automatische Datensicherung einrichten oder Überspringen auswählen.

So stellen Sie eine gesicherte Datei wieder her:

Wenn eine Datei im Ordner für die automatische Sicherung gespeichert wird, wird hinter dem Dateinamen „Wiederherstellen“ angezeigt. Um eine benutzerdefinierte Datei in Ihrer Vokabularliste wiederherzustellen, wählen Sie Wiederherstellen.

Wenn die Datei in Ihrer Vokabularliste wiederhergestellt wird, wird im Verzeichnis für die automatische Datensicherung nach dem Dateinamen ein Häkchen anstelle von „Wiederherstellen“ angezeigt.

Vokabular wählen

Unity AAC ist eine Methode zur Organisation der deutschen Sprache, die für PRC-Salttillo-Geräte einzigartig ist. Sie basiert in erster Linie auf den einzelnen Wörtern, die wir am häufigsten sagen. Sie entwickelt sich von den ersten Wörtern bis zur Erwachsenensprache. Unity AAC bietet eine Reihe von Seitensätzen mit unterschiedlicher Anzahl von Tastenfeldern. Diese Sätze von Seiten werden jeweils als Vokabulardateien bezeichnet.

Um die Liste der Vokabulardateien zu öffnen und die Beschreibungen anzuzeigen, gehen Sie zu Vokabular und Vokabular auswählen.

Um ein Vokabular zu öffnen, wählen Sie es aus der Liste aus und wählen Sie Öffnen.

Um eine Kopie zu erstellen und ein Vokabular anzupassen, wählen Sie es aus der Liste aus und wählen Sie Anpassen. Fügen Sie einen neuen Titel und eine neue Beschreibung für die kopierte Datei hinzu. Die Vokabulardatei wird geöffnet und Sie können mit dem [Bearbeiten von Tasten](#) beginnen.

Hinweis: Alle angepassten Dateien werden oben in der Vokabularübersicht unter „Meine Dateien“ gespeichert.

Verwandte Ressourcen

Um verfügbare Vokabulardateien in unterschiedlichen Sprachen/für unterschiedliche Regionen anzuzeigen, siehe [Sprache/Region hinzufügen](#).

Informationen zur Verwendung der Unity AAC-Vokabulare finden Sie unter [Mit Vokabulardateien arbeiten](#).

Unity AAC Menü-Übersicht

Um auf die App-Menüs zuzugreifen, wählen Sie Menü. Welche Menüoptionen angezeigt werden, hängt davon ab, an welcher Stelle Sie sich in der App befinden und ob der Editiermodus aktiviert ist. Unten sehen Sie einige Beispiele.


Menü-Optionen bei deaktiviertem Editiermodus:



Menüoptionen bei aktiviertem Editiermodus:



Menüoptionen nach Auswahl von Vokabular > Vokabular auswählen > Menü:

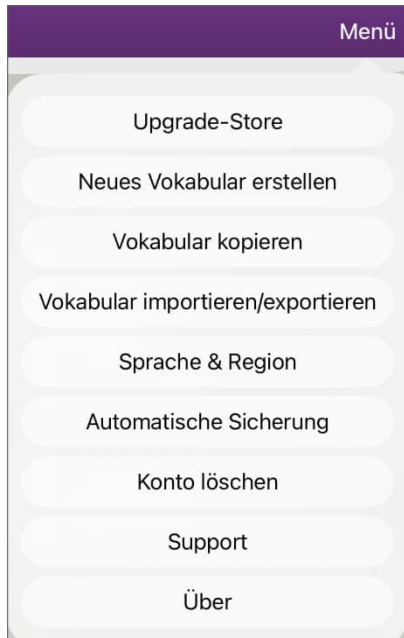

Wortsuche

Wenn Sie nicht wissen, wo sich ein Wort im aktuellen Vokabular befindet, verwenden Sie die Wortsuche, um nach dem Wort zu suchen und die Abfolge von Tasten auszuwählen, die dorthin führt.

1. Öffnen Sie die Wortsuche mit einer der folgenden Methoden.
 - Wählen Sie im Vokabular Menü und dann Wortsuche.
ODER
 - Öffnen Sie im Vokabular die Schriftseite und wählen Sie anschließend Wortsuche.
2. Geben Sie das gesuchte Wort ein.
3. Wählen Sie Suchen.

Hinweis: Wenn das Wort nicht gespeichert ist, bleibt die Taste Suchen ausgegraut, und Sie können sie nicht auswählen.
4. Das Fenster zeigt die Tasten an, auf die Sie der Reihe nach tippen müssen, um das Wort zu aktivieren.
5. Wählen Sie die Tasten, um das Bewegungsmuster zu üben.

Wenn Sie die erste Taste in der Sequenz wählen, wird Ihre Startseite geöffnet und die betreffende Taste hervorgehoben. Wenn Sie die Taste auswählen, wird die nächste Taste in der Sequenz hervorgehoben. Wenn Sie diese Taste auswählen, wird die nächste Taste hervorgehoben usw., bis die Sequenz zu Ende ist.

Software-Updates

Wenn eine neue Version verfügbar ist, wird das App Store-Symbol mit einer Zahl oben rechts im Symbol angezeigt.

Wichtig:

- Für die Durchführung eines Software-Updates muss die WLAN-Verbindung aktiviert sein.
- Um die App-Version über 2025.4.0 hinaus zu aktualisieren, muss auf Ihrem Gerät iPadOS 15 oder iOS 15 oder höher installiert sein.

So aktualisieren Sie auf die neueste Version:

1. Öffnen Sie den App Store.
2. Wählen Sie Ihr Apple-Konto-Profilesymbol aus.
3. Wählen Sie Aktualisieren, um eine Liste von Apps zu öffnen, die nicht auf dem neuesten Stand sind.
4. Wählen Sie neben einer App Aktualisieren, um nur diese App zu aktualisieren, oder wählen Sie Alle aktualisieren.

Unity AAC-Einstellungen – Übersicht

Um die Einstellungen der Unity AAC-App zu öffnen, wählen Sie Menü > Einstellungen. Scrollen Sie im Bildschirm „Einstellungen“, um alle verfügbaren Einstellungen zu sehen. Wenn Sie die Änderungen der Einstellungen abgeschlossen haben, wählen Sie das Häkchen .

Profile

Profil sichern

Um die aktuellen App-Einstellungen als Profil für den einfachen Zugriff zu einem späteren Zeitpunkt zu speichern, wählen Sie Profil sichern, geben einen Namen für das Profil ein und wählen dann Sichern.

Profil laden

Um ein Profil zu laden, wählen Sie Profil laden und wählen den entsprechenden Profilnamen aus.

Feedback

Gesten erlauben

Ermöglicht es Ihnen, einer Seite eine Geste hinzuzufügen, z. B. das Wischen nach links oder rechts, um eine Aktion auszulösen.

Gesten-Klang

Gibt akustisches Feedback, wenn eine Geste ausgeführt wird.

Tastenklick

Gibt akustisches Feedback, wenn eine Taste ausgewählt wird.

Funktionssymbole

Zeigt die kleinen Navigationspfeile in der oberen rechten Ecke aller Tasten an. Wenn die Einstellung deaktiviert ist, werden die Pfeile ausgeblendet.

Anzeigeformat

Statusleiste

Wenn die Option Statusleiste aktiviert ist, wird oberhalb des Textfensters der Gerätestatus angezeigt..

Gitter benutzen

Hiermit wird die Anzeige an ein Fingerführungsgitter angepasst. Wählen Sie Menü > Einstellungen und scrollen Sie zum Abschnitt „Anzeigeformat“. Wählen Sie dann Gitter benutzen.

Aus: Wählen Sie diese Option, wenn Sie kein Fingerführungsgitter verwenden.

Allgemein: Wählen Sie diese Option aus, wenn die App auf einem aktuellen Via®-Gerät oder einem Gerät ausgeführt wird, dass nicht von PRC-Salttillo stammt.

PRC-Salttillo: Diese Option wird nur angezeigt, wenn sie von Ihrem Via-Gerät unterstützt wird. Wählen Sie die Option, um die Anzeige anzupassen.


Eigene: Wählen Sie diese Option aus, wenn ein Problem beim Ausrichten eines Gitters auf einem iPad auftritt, auf dem eine PRC-Salttillo App ausgeführt wird. Nach einem App- oder Apple-Software-Update können Probleme mit der Ausrichtung des Gitters auftreten. Diese Option gilt nicht für Via-Geräte.

So richten Sie die Software an die Größe des Gitters an:

1. Gehen Sie zu Menü > Einstellungen > Gitter benutzen.
2. Wählen Sie Eigene. Die Option „Randstärken individuell festlegen“ wird unten in der Liste angezeigt.



3. Wählen Sie Randstärken individuell festlegen. In einem Fenster werden Maße angezeigt (basierend auf Punkten).

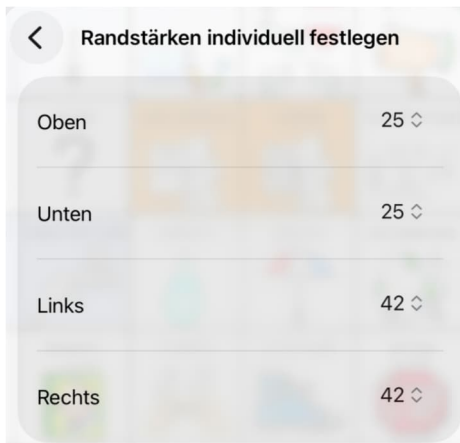

4. Passen Sie die Einstellungen Oben, Unten, Links und Rechts an.
 - a. Tippen Sie auf den kleinen Aufwärts- und Abwärtspfeil rechts neben jedem Maß, um die angezeigte Zahl zu ändern.
 - b. Passen Sie die Zahlen weiter an, bis das Gitter mit der Software ausgerichtet ist.

Menüsperre

Passwort Menüsperre

Hier können Sie das gewünschte Passwort eingeben.

Menü mit Passwort entsperren

Für den Zugriff auf die Bearbeitungsmenüs ist ein Passwort erforderlich.

Vokabulare löschen erlauben

Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird verhindert, dass Sie versehentlich eine benutzerdefinierte Datei löschen. Aktivieren Sie diese Einstellung nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie eine bestimmte benutzerdefinierte Vokabulardatei löschen möchten.

Sprache

Stimme

Ermöglicht die Auswahl von Stimmen zum Herunterladen und Installieren. Da es viele mögliche Stimmen gibt, können Stimmen heruntergeladen werden. Wenn Sie nur die benötigten Stimmen herunterladen und installieren, sparen Sie viel Speicherplatz auf Ihrem Gerät.

Die Einstellung „Stimme“ zeigt die aktuell ausgewählte Stimme an. Um eine andere Stimme herunterzuladen und zu installieren, wählen Sie Stimme, um eine Liste der verfügbaren Stimmen zu öffnen. Um sich eine Stimme anzuhören, wählen Sie das Wiedergabesymbol. Hören Sie sich mehrere Stimmen an. Wenn Sie die gewünschte Stimme gefunden haben, wählen Sie das Download-Symbol, um sie herunterzuladen und zu installieren.

Telefon-/ FaceTime-Stimme

Hiermit können Sie die Stimme auswählen, die Sie für Telefonanrufe verwenden möchten. Die Einstellung „Telefon-/FaceTime-Stimme“ zeigt die aktuell ausgewählte Stimme an.

- Um eine andere Stimme herunterzuladen und zu installieren, wählen Sie Telefon/FaceTime Voice (Stimme für Telefon/FaceTime), um eine Liste der verfügbaren Stimmen zu öffnen.
- Um sich eine Stimme anzuhören, wählen Sie das Wiedergabesymbol.
- Wenn Sie die gewünschte Stimme gefunden haben, wählen Sie das Symbol , um sie herunterzuladen und zu installieren.

Novelty Stimmen

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden der Liste der verfügbaren Stimmen die Novelty- Stimmen hinzugefügt.

Textfenster (TF)

Textfenster verbergen

Blendet das gesamte Textfenster aus.

Kopieren und Einfügen erlauben

Hiermit kann der Benutzer Inhalte aus dem Textfenster kopieren/einfügen.

Automatische Großschreibung

Das erste Wort eines Satzes wird automatisch großgeschrieben.

Schriftart

Hiermit können Sie eine der verfügbaren Schriftarten für den Text im Textfenster auswählen.

Schriftgröße

Legt Sie die Schriftgröße fest, die im Textfenster angezeigt wird. Die Schriftgrößen reichen von 14 bis 72 Punkt.

Hinweis: Wenn Sie versuchen, eine Schriftgröße und eine Zeilenanzahl auszuwählen, die zusammen dazu führen würden, dass das Textfenster größer ist als der Bildschirm, wird die Schriftgröße automatisch auf einen Wert reduziert, der bewirkt, dass das Textfenster nicht mehr als 60 % des Bildschirms einnimmt.

Schriftfarbe

Hiermit können Sie eine der verfügbaren Schriftfarben für den Text im Textfenster auswählen.

Hintergrundfarbe

Hiermit können Sie eine der verfügbaren Hintergrundfarben für den Text im Textfenster auswählen.

Anzahl der Zeilen

Hiermit können Sie festlegen, wie viele Textzeilen im Textfenster angezeigt werden sollen. Die Anzahl der Zeilen variiert zwischen 1 und 10.

Sichtbarer Cursor

Zeigt den Cursor im Textfenster an. Deaktivieren Sie diese Einstellung, wenn der Cursor nicht im Textfenster angezeigt werden soll. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist und Sie den Cursor am Ende des Textfensters einfügen, während der Modus „Cursor platzieren“ aktiv ist, wird der Cursor nicht angezeigt.

Cursor platzieren erlauben

Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn „Cursor platzieren“ im Textfenster-Kontextmenü als Option angezeigt werden soll. Auf diese Weise können Sie das Textfenster gedrückt halten, um den Cursor zu platzieren, ohne eine Taste zum Platzieren des Cursors einzurichten.

Textfenster-Aktion

Hiermit können Sie für das Textfenster Alles sprechen, Sprechen und Maximieren oder Keine Aktion auswählen.

Gesprochenes Wort hervorheben

Wählen Sie eine Farbe aus, um die im Textfenster hervorgehobenen Wörter anzuzeigen, während sie gesprochen werden.

Hervorhebungsfarbe Telefon/FaceTime

Hiermit können Sie eine Farbe auswählen, um die während eines Telefonats gesprochenen Wörter im Textfenster hervorgehoben zu sehen.

Maximiertes Textfenster

Schriftart

Ermöglicht die Auswahl einer der sieben verfügbaren Schriftarten für den Text im maximierten Textfenster.

Schriftgröße

Legt die Schriftgröße fest, die im maximierten Textfenster angezeigt wird.

Schriftfarbe

Hiermit können Sie eine der verfügbaren Schriftfarben für den Text im maximierten Textfenster auswählen.

Hintergrundfarbe

Hiermit können Sie eine der verfügbaren Hintergrundfarben für das maximierte Textfenster auszuwählen.

KI-Funktionen

KI-Funktionen aktivieren: Wenn Ihr Gerät Apple Intelligence™ und iPadOS 26 oder höher enthält, wählen Sie den Ein-/Ausschalter, um die KI-Funktionen zu aktivieren.

Textfenster ändern: Nutzen Sie KI, um Grammatik-, Zeichensetzungs- und Rechtschreibfehler im Textfenster zu korrigieren, Texte im Textfenster durch kreativere Texte zu ersetzen oder Texte im Textfenster in eine andere Sprache zu übersetzen. Diese Einstellung bietet zwei Optionen:

KI-Nachrichtenbearbeitung: Korrigiert Grammatik- und Rechtschreibfehler.

KI-Übersetzung: Übersetzt das Textfenster mit einer beliebigen von Apple unterstützten Sprache.

KI-Bildgenerierung: Nutzen Sie KI, um auf Basis Ihrer Eingaben Bilder zu erstellen.

KI-Seitenerstellung: Nutzen Sie KI, um bei der Erstellung einer benutzerdefinierten Seite eine Wortliste zu erstellen.

Sprachausgabe

Zeichen sprechen

Jeder eingegebene Buchstaben wird sofort gesprochen.

Wort sprechen

Jedes eingegebene Wort wird sofort gesprochen.

Satz sprechen

Jeder eingegebene Satz wird sofort gesprochen.

Textfenster automatisch löschen

Hiermit können Sie festlegen, was mit dem Text im Textfenster nach dem Sprechen geschieht.

- Aus: Der gesprochene Text bleibt so lange im Textfenster sichtbar, bis Sie ihn löschen.
- Sofort: Der gesprochene Text wird automatisch aus dem Textfenster gelöscht, nachdem er gesprochen wurde.
- Mit der nächsten Eingabe: Der Text im Textfenster wird automatisch gelöscht, wenn Sie eine Taste in Ihrem Vokabular aktivieren.

Verhindere Unterbrechung

Verhindert Unterbrechungen beim Sprechen eines Satzes, falls Sie versehentlich während der Sprachwiedergabe eine andere Taste drücken.

Neigung

Hinweis: Die Neigungseinstellungen sind nur verfügbar, wenn die App auf einem iPhone ausgeführt wird.

Bevorzugte Ausrichtung

Mit „Bevorzugte Ausrichtung“ können Sie die bevorzugte Bildschirmausrichtung je nach Ausrichtung des Telefons festlegen. Wenn Sie das Telefon im Hochformat halten, wird auf dem Bildschirm „Hochformat“ angezeigt. Wenn Sie das Telefon im Querformat halten, wird auf dem Bildschirm „Querformat“ angezeigt. Wählen Sie Wählen, um Ihre bevorzugte Ausrichtung einzustellen.

Aktion beim Neigen des Geräts

Hiermit wird festgelegt, ob sich das Bewegen des Telefons auf die Bildschirmausrichtung auswirkt. Verfügbare Optionen sind „Display wird neu ausgerichtet“ und „Keine Aktion“.

- Wenn Display wird neu ausgerichtet ausgewählt ist, wird der Bildschirm automatisch neu ausgerichtet, wenn das Gerät bewegt wird.
- Wenn Keine Aktion ausgewählt ist, bleibt der Bildschirm in derselben Ausrichtung gesperrt, wenn Sie das Gerät bewegen.

Sprachdatenaufzeichnung

Sprachdaten aufzeichnen

Aktivieren Sie die Sprachdatenaufzeichnung, damit Ihr Gerät Sprachnutzungsdaten aufzeichnen kann, die Sie zur webbasierten Analyse auf die Realize Language™-Website hochladen können.

Privatsphärenpasswort

Hiermit können Sie Ihr Privatsphärenpasswort für die Datenprotokollierung festlegen oder ändern.

Aufzeichnung löschen

Löscht die Nutzungsdaten des aktuellen Benutzers.

Realize Language einrichten

Hiermit können die für eine Person erfassten Daten zur Analyse auf die Realize Language-Website hochgeladen werden.

Tasten

Beim Loslassen auslösen

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird eine Taste erst aktiviert, wenn sie losgelassen wird, anstatt bei der Berührung.

Verweildauer

Steuert die Verzögerung, bevor ein Tastendruck erkannt wird, falls ein Benutzer mit seinem Finger über mehrere Tasten gleiten muss, bevor er die gewünschte Taste drückt.

Loslassdauer

Tasten: Alle Tasten sind für einen bestimmten Zeitraum nach jeder Tastenaktivierung deaktiviert, um eine versehentliche doppelte Aktivierung zu verhindern.

Textfenster: Das Textfenster wird für den angegebenen Zeitraum deaktiviert, nachdem der Benutzer auf das Textfenster getippt hat, um ein versehentliches Sprechen von Wörtern zu verhindern, die im Textfenster angezeigt werden.

Schriftgröße beibehalten

Sorgt für eine einheitliche Schriftgröße der Tastenbeschriftungen. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird die Schriftgröße der Tastenbeschriftung automatisch so weit verkleinert, dass die gesamte Beschriftung in den Tastenbereich passt.

Auslösen anzeigen

Die Taste wird kurz hervorgehoben, wenn sie aktiviert ist.

Farbverlauf

Die Funktion „Farbverlauf“ lässt die Farben der Tasten allmählich ineinander übergehen.

Sättigung

Passt die Sättigung/Deckkraft (Intensität) des Farbverlaufs an, wenn Sie den Schieberegler bewegen.

- Durch Verschieben des Schiebereglers nach rechts wirken die Farben gesättigter/deckender (intensiver).
- Durch Verschieben des Schiebereglers nach links erscheinen die Farben weniger gesättigt/deckender (blasser).

Hintergrundfarbe

Wählen Sie eine Farbe für leere Tasten auf Vokabularseiten aus.

Raster anzeigen

Die Funktion „Raster anzeigen“ blendet in leeren Tastenbereichen ein sichtbares Raster ein.

Tastenrandgröße

Hiermit können Sie zusätzlichen Abstand um Tasten herum hinzufügen. Wählen Sie eine Option zwischen 1 Punkt und 100 Punkt aus. Die Standardgröße lautet „Keine“.

Label auf Startseite ausblenden

Blendet die Tastenlabel auf den Tasten der Startseite aus.

Vorhersage

Art der Vorhersage

- Wählen Sie „Lernend + festes Lexikon“ oder „Festes Lexikon“. Lernendes + festes Lexikon: Die Wortvorhersage beinhaltet die Möglichkeit, Wörter zu lernen und dem Wortvorhersage-Wörterbuch hinzuzufügen. Die Einstellungen, die für das Lernen gelten, sind verfügbar.
- Festes Lexikon: Bei der Wortvorhersage wird das mitgelieferte Wortvorhersage-Wörterbuch verwendet. Die Einstellungen, die für das Lernen gelten, sind nicht verfügbar.

Gelernte Wörter

Zeigt Wörter, die entweder (1) manuell hinzugefügt oder (2) im Vokabular gesprochen werden. Diese Wörter werden gegenüber den Wörtern des statischen Wörterbuchs priorisiert.

Whiteboard

Zeichnen in der geteilten Ansicht deaktivieren

Verhindert das Zeichnen auf der Whiteboard-Seite, wenn die geteilte Ansicht in den iOS-Einstellungen aktiviert ist.

Zeichnung in der geteilten Ansicht skalieren

Skaliert Whiteboard-Zeichnungen entsprechend der relativen Größe der App-Seite, wenn die geteilte Ansicht in den iOS-Einstellungen aktiviert ist.

Letzte Zeichnung automatisch laden

Zeigt die zuletzt auf dem Whiteboard erstellte Zeichnung an, wenn Sie das Whiteboard öffnen.

Zeichnung automatisch sichern

Speichert Whiteboard-Zeichnungen automatisch.

Kopfsteuerung

Hinweis: Die Kopfsteuerung ist nur auf iOS- oder iPadOS-Geräten mit einer nach vorne gerichteten TrueDepth®-Kamera möglich.

Kopfsteuerung aktivieren

Hier kann die Kopfsteuerung aktiviert und deaktiviert werden. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie mithilfe von kleinen Kopfbewegungen steuern, wohin sich der Zeiger auf dem Bildschirm bewegt.

Soziale Netzwerke

Hinweis: Diese Einstellung ist nur auf nicht-dedizierten Geräten verfügbar.

Soziale Netzwerke erlauben

Hiermit können Sie Text aus dem Textfenster in sozialen Netzwerken teilen.

Verstärker

Verstärker auswählen

Wählen Sie den Namen Ihres Verstärkers aus, um eine Bluetooth-Verbindung mit der App herzustellen, damit Sie den Verstärker-Batteriestatus korrekt ablesen können.

Verstärker einrichten

Stellt Lautstärke, Bässe und Höhen des linken und rechten Lautsprechers ein.

Scanning

Scanning aktivieren

Macht die Scaneinstellungen verfügbar. Siehe [Tastenscanning einrichten](#).

Kopfsteuerung einrichten

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie die Kopfsteuerung mit der Unity AAC-App einrichten und verwenden. Mit der Funktion zur Kopfsteuerung können Personen, die ihre Hände nicht verwenden können, alternativ kleine Kopfbewegungen verwenden, um die Bewegung des Cursors auf dem Bildschirm zu steuern. Die Frontkamera des Geräts übersetzt diese Kopfbewegungen in Cursor-Bewegungen und Aktivierungen/Auswahlen auf dem Bildschirm.

Hinweis: Die Kopfsteuerung ist nur auf iOS- oder iPadOS-Geräten mit einer nach vorne gerichteten TrueDepth®-Kamera möglich.

Kopfsteuerung ein- oder ausschalten

Um auf die Kopfsteuerung-Einstellungen zuzugreifen, wählen Sie Menü. > Einstellungen und scrollen Sie zum Abschnitt „Kopfsteuerung“. Wählen Sie Kopfsteuerung aktivieren, um die Kopfsteuerung ein- oder auszuschalten.

Wenn Sie die Kopfsteuerung zum ersten Mal aktivieren:

1. Sie werden zur Kalibrierung aufgefordert: „Kalibrierung erforderlich: Ihr Cursor ist möglicherweise ungenau. Bitte kalibrieren Sie jetzt.“
2. Wählen Sie Kalibrieren aus, und führen Sie das Kalibrierungsverfahren durch. Wenn Sie nicht bereit zur Kalibrierung sind, wählen Sie Später.
3. Sie werden aufgefordert, den Zugriff auf die Frontkamera des Geräts zu gestatten. Wählen Sie OK. Wenn Sie den Zugriff nicht zulassen, können Sie die Kopfsteuerung nicht verwenden.

Den Benutzer positionieren

 Die Positionierung von Benutzer und Gerät muss von einer fachlich qualifizierten Person überprüft werden, um Verletzungen des Benutzers durch wiederholte Belastung zu vermeiden.

Positionieren Sie den Benutzer etwa 25 bis 90 cm vom Gerätebildschirm entfernt. Oft haben Benutzer eine bessere Kontrolle, wenn der Abstand kleiner ist.

Wenn sich jemand neben dem Benutzer befindet, positionieren Sie das Gerät möglichst so, dass es direkt auf den Benutzer zeigt. Wenn die Kamera zwei Gesichter erkennt, wählt das Kopfsteuerungssystem das größere und deutlicher erkennbare Gesicht.

Kopfsteuerungseinstellungen

Es ist wichtig, die Kopfsteuerungseinstellungen in der App für den jeweiligen Benutzer zu optimieren.

Wichtig: Da die Kopfsteuerung von der Fähigkeit des Benutzers abhängt, seinen Kopf zu bewegen, werden in dieser Anleitung nur die Grundlagen der Einrichtung behandelt. Möglicherweise müssen Sie Ihre Einstellungen mehrmals anpassen. Wir empfehlen, immer nur eine Einstellung auf einmal zu ändern, damit sich der Benutzer jeweils eingewöhnen kann.

Eine Einstellung ändern

1. Wählen Sie Menü > Einstellungen, und scrollen Sie zum Abschnitt „Kopfsteuerung“.
2. Wählen Sie die zu ändernde Einstellung aus. Daraufhin wird eine Liste mit Optionen angezeigt.
3. Wählen Sie die gewünschte Option aus.
4. Wählen Sie .

Verfügbare Einstellungen

Kopfsteuerung aktivieren

Hier kann die Kopfsteuerung aktiviert und deaktiviert werden. Wenn Sie die Option „Kopfsteuerung aktivieren“ aktiviert ist, werden alle Kopfsteuerungseinstellungen angezeigt.

Cursor-Anpassung

Mithilfe der Cursor-Anpassungen können Sie die relative Position des Cursors anpassen, wenn der Benutzer nicht direkt vor dem Gerät positioniert werden kann.

Wählen Sie Zentrieren, um die Position des Cursors so anzupassen, dass er in Bezug auf die aktuelle Kopfposition des Benutzers zentriert ist. Wenn Sie die Ausrichtung oder die Position des Geräts relativ zum Benutzer ändern, müssen Sie den Cursor möglicherweise neu zentrieren.

Beispielsweise, wenn ein Gerät leicht links vom Benutzer auf einem Rollstuhl montiert ist. Aus diesem Grund kann der Cursor nach rechts verschoben erscheinen, wenn der Benutzer geradeaus blickt. Um dies zu kompensieren,

lassen Sie den Benutzer seinen Kopf in eine bequeme, natürliche Ausgangsposition bringen, und wählen Sie dann „Zentrieren“. Dadurch wird der Cursor automatisch so angepasst, dass er relativ zum Benutzer wieder auf dem Bildschirm zentriert ist.

Wenn Sie Zentrieren wählen, wird der Cursor vorübergehend ausgeblendet und das Zentrierungsbild  wird in der Mitte des Bildschirms angezeigt. Bitten Sie den Benutzer, das Bild anzusehen, bis das Bild verschwindet (nach drei Sekunden). Der Cursor wird zentriert.

Tipp: Sie können den Cursor auch zentrieren, indem Sie im Vokabular eine Zentrierungstaste einrichten.

1. Navigieren Sie zu der Seite mit der zu verwendenden Taste.
2. Wählen Sie Menü, dann Seite bearbeiten, dann die gewünschte Taste, und schließlich Taste bearbeiten.
3. Geben Sie der Taste einen Namen, der ihren Zweck beschreibt.
4. Scrollen Sie zum Abschnitt „Tastenfunktion“.
5. Wählen Sie Hinzufügen.
6. Scrollen Sie durch die Liste der Aktionen, und wählen Sie Kopfsteuerung zentrieren.
7. Wählen Sie Sichern. Wählen Sie Fertig, um den Editiermodus zu beenden.

Tracking-Geschwindigkeit

Die relative Geschwindigkeit, mit der sich der Cursor bei jeder Kopfbewegung auf dem Bildschirm bewegt. Wählen Sie eine der folgenden Geschwindigkeiten: „Sehr langsam“, „Langsam“ (Standard), „Normal“, „Schnell“ und „Sehr schnell“. Bei langsameren Einstellungen ist eine stärkere Kopfbewegung erforderlich, bei den schnelleren Einstellungen eine weniger starke.

Cursorform

Der dargestellte Cursortyp zur Angabe der Kopfposition, während Sie den Kopf bewegen und Optionen auswählen. Sie können die Kopfposition mit dem Cursor, durch Hervorhebung oder beides gleichzeitig angeben.

Die folgenden Cursor-Formen stehen zur Auswahl:

Punkt (Standard) — Ein roter, undurchsichtiger Punkt 

Fadenkreuz — Ein Pluszeichen mit sich in der Mitte kreuzenden Linien 

Pfeil — Ein schwarzer, undurchsichtiger Zeiger 

Wenn Sie für den Cursortyp auf Kein auswählen, sollten Sie möglichst die Einstellung „Tasten hervorheben“ aktivieren. Wenn Sie „Tasten hervorheben“ deaktivieren, ist kein Cursor sichtbar, und Sie haben keine visuelle Möglichkeit, die Kopfbewegung zu verfolgen.

„Außerhalb des Bildschirms“-Anzeige

Zeigt an, wenn die Kopfbewegung den Cursor nach links, rechts, oben, unten oder in einer beliebigen Ecke vom Bildschirm verschiebt. Wählen Sie unter den folgenden „Außerhalb des Bildschirms“-Anzeigen.

Keine – Es erscheint keine „Außerhalb des Bildschirms“-Anzeige.

Punkt – Am Rand des Bildschirms wird ein Punkt angezeigt. Der Punkt wird größer, je weiter Sie sich vom Bildschirm entfernen.

Dreieck – Am Rand des Bildschirms wird ein Dreieck angezeigt

Auslöser

Die Kopf- oder Gesichtsbewegung, die eine Aktivierung bewirkt. Wenn Sie den Kopf nicht mehr bewegen, um auf das gewünschte Element zu zeigen, wird der Cursor auf diesem Element angezeigt oder das Element wird hervorgehoben. Die ausgewählte Aktion aktiviert dann das Element. Wählen Sie unter den folgenden Auslösern.

Kein – Es werden keine Aktivierungen vorgenommen

Verweilen – Wenn Sie über einen längeren Zeitraum auf ein Element zeigen, beginnt sich ein Kreis um den Cursor zu bilden. Beispiel: . Wenn der Kreis geschlossen ist (abhängig von der Einstellung für die Verweilzeit), wird das Element aktiviert. Wenn Sie den Cursor vom Element wegbewegen, bevor der Kreis fertiggestellt ist, wird das Element nicht aktiviert.

Hinweis: Wenn Sie „Verweilen“ als Auslöser wählen, ersetzt die Einstellung „Verweildauer“ die Einstellung „Auslöseempfindlichkeit“.

Wichtig: Wenn Sie Verweilen als Auslöser wählen, versuchen Sie nicht, die Kopfsteuerung zu pausieren. Derzeit wird die Kopfsteuerung durch den Verweil-Auslöser nicht fortgesetzt.

Blinzeln – Blinzeln Sie mit den Augen, um eine Aktivierung zu bewirken.

Mund öffnen – Öffnen Sie den Mund, um eine Aktivierung zu bewirken.

Augenbrauen hochziehen – Ziehen Sie die Augenbrauen nach oben, um eine Aktivierung zu bewirken.

Zunge rausstrecken – Strecken Sie die Zunge heraus, um eine Aktivierung zu bewirken.

Lächeln – Lächeln Sie, um eine Aktivierung zu bewirken.

Stirnrunzeln – Runzeln Sie die Stirn, um eine Aktivierung zu bewirken.

Taste – Verwenden Sie eine externe Taste, um eine Aktivierung zu bewirken.

Taste konfigurieren

Zum Konfigurieren einer externen Taste

Auslöse-Empfindlichkeit

Der Grad der Auslösebewegung, der für eine Aktivierung erforderlich ist. Wählen Sie „Niedrig“, „Mittel“ oder die Standardeinstellung „Hoch“.

Hinweis: Wenn Sie Verweilen als Auslöser wählen, ersetzt die Einstellung „Verweildauer“ die Einstellung „Auslöseempfindlichkeit“.

Ruhezone

Die Ruhezone ist ein inaktiver Bereich, der den letzten Aktivierungspunkt umgibt. In diesem Bereich kann sich der Benutzer ausruhen, bevor er zur nächsten Aktivierung übergeht. Wenn sich der Benutzer in der Ruhezone befindet, werden durch die Kopfsteuerung keine Aktivierungen über einen Auslöser vorgenommen. Um auf die Einstellungen für die Ruhezone zuzugreifen, wählen Sie in den Kopfsteuerungseinstellungen die Option Ruhezone. Die Einstellungen für die Ruhezone werden angezeigt.

So aktivieren Sie die Ruhezone: Wählen Sie die Taste „Ruhezone ein/aus“, um die Ruhezone einzuschalten. Durch Aktivierung der Taste werden die Ruhezone und die Ruhezoneneinstellungen aktiviert.

Hinweis: Wenn die Ein-/Ausschalttaste für die Ruhezone ausgeschaltet ist, sind die Einstellungen für die Ruhezone nicht verfügbar.

So legen Sie die Größe der Ruhezone fest: Wählen Sie Größe der Ruhezone, um ein Fenster zum Anpassen des Ruhezonradius zu öffnen. Wählen Sie einen Wert aus, und wählen Sie dann OK.

Hinweis: Auch wenn der Wert für die Größe der Ruhezone auf Aus eingestellt ist, ist die Option „Taste als Ruhezone verwenden“ weiterhin verfügbar.

So verwenden Sie das zuletzt aktivierte Tastenfeld als Ruhezone: Wählen Sie Taste als Ruhezone verwenden. Das zuletzt aktivierte Tastenfeld wird zur Ruhezone. Während sich der Zeiger innerhalb der Taste befindet, werden durch die Kopfsteuerung keine Aktivierungen vorgenommen, sodass sich der Benutzer ausruhen kann. „Ruhezone anzeigen“ und „Größe der Ruhezone“ sind nicht erforderlich und daher nicht verfügbar, wenn die Option „Taste als Ruhezone verwenden“ ausgewählt ist.

So machen Sie die Ruhezone auf dem Bildschirm sichtbar: Wählen Sie Ruhezone anzeigen. Ein heller Kreis umgibt den Rand der Ruhezone. Wenn Sie „Ruhezone anzeigen“ auswählen, wird der Ruhebereich selbst dadurch nicht aktiviert. Die Ruhezone wird dadurch lediglich auf dem Bildschirm sichtbar. Mit der Einstellung „Ruhezone ein/aus“ (siehe oben) wird die Ruhezone aktiviert und deaktiviert. *So verlassen Sie die Ruhezone:* Um die Ruhezone zu verlassen und die Aktivierung fortzusetzen, bewegt der Benutzer den Cursor einfach aus dem Ruhezonkreis oder von der als Ruhezone verwendeten Taste weg.

Auslöse-Indikator

Die visuelle Anzeige, dass ein Element aktiviert wurde. Wählen Sie eine der folgenden Indikatoren:

Kein – Keine visuelle Anzeige

Punkt – Ein heller, transparenter Punkt 

Feuerwerk – Ein Sternenexplosion 

Hinweis: Ein rotes X wird angezeigt, wenn Sie versuchen, Ihren Auslöser für ein nicht auswählbares Element zu verwenden.

Tasten hervorheben

Wenn „Tasten hervorheben“ aktiviert ist, werden die Tasten durch eine farbige Umrandung hervorgehoben, um die Kopfposition anzuzeigen, während Sie den Kopf bewegen. Wählen Sie diese Option, um die Hervorhebung zu aktivieren. Sie können die Kopfposition durch den Cursor, durch Hervorhebung oder beides gleichzeitig angezeigt bekommen. Die Option „Tasten hervorheben“ ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie „Tasten hervorheben“ deaktivieren, wählen Sie auf jeden Fall eine Cursor-Form aus. Wenn Sie „Tasten hervorheben“ deaktivieren und die Cursor-Form auf „Kein“ setzen, haben Sie keine visuelle Möglichkeit, die Kopfbewegung zu verfolgen.

Cursorglättung

Die Glättung gleicht kleine Zitterbewegungen aus, um versehentliche Tastenbetätigungen zu verhindern. Je größer die ungewollte Kopfbewegung des Benutzers ist, desto mehr müssen Sie möglicherweise den Glättungswert erhöhen, um diese zu kompensieren. Ein geringerer Glättungswert macht den Cursor auch reaktionsschneller. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Niedrig – Der Cursor erscheint weniger stabil, reagiert aber besser auf Kopfbewegungen.

Mittel – Der Cursor erscheint etwas stabiler und reagiert etwas weniger auf Kopfbewegungen.

Hoch – Der Cursor erscheint sehr stabil, reagiert aber weniger auf Kopfbewegungen.

Beim Start pausieren

Wenn Sie die Option Kopfsteuerung aktivieren einschalten, wird die Kopfsteuerung pausiert und „Fortsetzen“ wird mittig zwischen „Vokabular“ und „Menü“ angezeigt. Aktivieren Sie Fortsetzen, um eine Auswahl zu treffen.

Zusätzliche Einstellung – Zeit für automatische Sperre

Wenn der Bildschirm des Geräts gedimmt wird, während Sie die Kopfsteuerung verwenden, ändern Sie die Zeit für die automatische Sperre. Ändern Sie die Zeit nur so weit wie nötig. Längere Zeiten für die automatische Sperre erfordern mehr Batteriestrom.

1. Öffnen Sie die iPad-Einstellungen.
2. Wählen Sie Anzeige und Helligkeit im linken Fensterbereich aus.
3. Wählen Sie im rechten Fensterbereich Automatische Sperre.
4. Wählen Sie den nächsthöheren Zeitwert aus.
5. Kehren Sie zur App zurück, und verwenden Sie wieder die Kopfsteuerung.
6. Wenn der Bildschirm immer noch zu früh abdunkelt, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5.

Tipps zur Kopfsteuerung

Pausieren der Kopfsteuerung

Wenn Sie die Kopfsteuerung einschalten, wird „Pause“ zwischen „Vokabular“ und „Menü“ angezeigt. Wenn Sie „Pause“ aktivieren, wird die Kopfsteuerung vorübergehend angehalten, und „Fortsetzen“ wird angezeigt. Verwenden Sie den Auslöser, um „Fortsetzen“ zu aktivieren und die Kopfsteuerung erneut zu starten.

Hinweis: Wenn die Kopfsteuerung-Einstellung Beim Start pausieren aktiviert ist, wird die Kopfsteuerung beim Öffnen standardmäßig angehalten. Aktivieren Sie einfach Fortsetzen, um eine Auswahl zu treffen.

Scrollen

Wenn die Kopfsteuerung aktiviert ist, werden in den Ecken der App-Einstellungen und App-Vokabularliste Schnellaufpfeile angezeigt. Wenn Sie durch diese Listen scrollen müssen, zeigen Sie auf die entsprechenden Schnellaufpfeile in und aktivieren Sie sie.

-  Nach unten durch die gezeigten Elemente scrollen
-  Nach oben durch die gezeigten Elemente scrollen
-  Zum Ende der Liste springen
-  Zum Anfang der Liste springen

Tastenscanning einrichten

Als Alternative zur direkten Auswahl der einzelnen Tastenfelder auf dem Bildschirm bietet die Unity AAC-App Scanfunktionen zur Auswahl mit einem oder zwei Tasten.

Wichtig: Um die Scanfunktion in Unity AAC zu nutzen, können Sie verschiedene Tasten verwenden. Wenn Sie einen AeroSwitch® verwenden, stellen Sie den Drehknopf auf 0, 1 oder 2 (Broadcast-Modus). Wenn Sie eine drahtlose Taste eines Drittanbieters verwenden, (z. B. AbleNet® Blue2 oder eine Bluetooth®-Tastatur), richten Sie in den iPadOS-Einstellungen zunächst eine Bluetooth-Verbindung ein und richten Sie die Taste dann in den Einstellungen der Unity AAC ein. Wenn Sie eine kabelgebundene Taste eines Drittanbieters verwenden (z. B. Tapio), richten Sie die Taste in den Einstellungen der Unity AAC-App ein.

Einen oder zwei Tasten einrichten

Sie können in der App eine oder zwei kabelgebundene oder drahtlose-Tasten einrichten, um mit der Scanfunktion zu arbeiten.

 Die Kabel stellen eine potenzielle Verwicklungs- oder Strangulierungsgefahr dar. Bitte bedenken Sie dies, bevor Sie sie Gerätebenutzern zur Verfügung stellen.

1. Schließen Sie jede Taste an oder koppeln Sie sie.

Kabelgebundener Taste/n: Verbinden Sie die Taste mit Tastebuchse A oder Tastebuchse B am Gerät. Wenn Sie zwei Tasten verwenden, verbinden Sie mit jeder Buchse einen Taste.

Drahtlose Taste/n: Schalten Sie den Tasten ein, und koppeln Sie sie mit dem Gerät gemäß den Anweisungen, die mit der Taste/den Tasten geliefert wurden.

2. Um die Scanfunktion zu aktivieren, wählen Sie Menü > Einstellungen, scrollen zum Abschnitt „Scanning“, und aktivieren die Option Scanning aktivieren.
3. Wählen Sie Tasten konfigurieren, um den oder die Tasten einzurichten. Die Einstellungen für den Tastenzugriff werden angezeigt.
4. Wählen Sie Tasten konfigurieren, und geben Sie an, wie viele Tasten Sie verwenden möchten.

Wenn Sie 1 Taste auswählen, ist Taste 1 aktiviert und Taste 2 deaktiviert.

Wenn Sie 2 Tasten wählen, sind sowohl Taste 1 als auch Taste 2 aktiviert.

Hinweis: Wenn in einer Einstellung für Taste 1 oder Taste 2 „(Links)“ oder „(Rechts)“ angezeigt wird, hat dies keinen Einfluss auf die Einstellung der Taste. Dies bezieht sich nur auf die interne technische Konfiguration der Taste, die Sie ignorieren können.

5. Um Taste 1 einzurichten, wählen Sie Taste 1: Daraufhin wird die Aufforderung „Taste betätigen“ angezeigt. Drücken Sie die Taste, die zum Starten und Stoppen des Scans vorgesehen ist.
6. Um Taste 2 einzurichten, wählen Sie Taste 2: Daraufhin wird die Aufforderung „Taste betätigen“ angezeigt. Drücken Sie die Taste, die für die Auswahl oder Aktivierung bestimmt ist.

Hinweis: Um den Berührungsbildschirm als Taste 1 oder 2 zu verwenden, tippen Sie bei der Aufforderung „Taste betätigen“ auf den Berührungsbildschirm.

7. Passen Sie die restlichen Scaneinstellungen nach Bedarf an.

Unity AAC-Scaneinstellungen

Um auf die Optionen zum Anpassen einer Scanmethode zuzugreifen, wählen Sie Menü > Einstellungen.

Scanning aktivieren

Schaltet das Scannen ein oder aus. Sie müssen das Scannen aktivieren, um auf die anderen Scaneinstellungen zugreifen zu können.

Tasten konfigurieren

Richten Sie eine oder zwei externe Tasten oder den Berührungsbildschirm ein, um mit der Scanfunktion zu arbeiten.

Auto-Scan

Sie können wählen, ob der Scanvorgang automatisch aktiviert werden soll oder ob Sie die Taste gedrückt halten oder die einzelnen Positionen durchschalten möchten. Wenn Sie die Scanfunktion aktivieren möchten, ohne eine Taste gedrückt zu halten, schalten Sie „Auto-Scan“ ein. Wenn Auto-Scan ausgeschaltet ist, ist eine Tastenaktivierung erforderlich, um beim Scanning die einzelnen Tastenfelder durchzuschalten.

Taste-Halten-Scanning

Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn „Auto-Scan“ deaktiviert ist.

Wenn „Taste-Halten-Scanning“ aktiviert ist, können Sie eine Taste gedrückt halten, um das ausgewählte Scanmuster zu durchlaufen. Wenn Sie eine Taste verwenden, wird eine Auswahl beim Loslassen der Taste getroffen. Wenn Sie zwei Tasten verwenden, bewegt sich die erste Taste durch das Scanmuster und die zweite Taste wählt das gewünschte Tastenfeld aus.

Auto-Restart

Wenn sowohl „Auto-Scan“ als auch „Auto-Restart“ eingeschaltet sind, wird der Scan-Zyklus nach einer Aktivierung automatisch neu gestartet.

Ansage-Scanning

Mit „Ansage-Scanning“ wird Audio-Feedback während des Scannings aktiviert. Um akustische Hinweise zu erhalten, schalten Sie „Ansage-Scanning“ ein. Wählen Sie ein Tastenfeld aus, um die Hinweise zu hören. Um eine Mitteilung abzurufen, aktivieren Sie die Taste erneut, nachdem Sie den Hinweis gehört haben.

Ansagenstimme

Ermöglicht die Auswahl der für Ansagen verwendeten Stimme. Wenn Sie eine Stimme für akustische Hinweise auswählen, kann es hilfreich sein, hierfür eine andere Stimme als die Stimme zu wählen, die das System für das Sprechen von Mitteilungen verwendet. Um die Stimme zu ändern, wählen Sie „Ansagenstimme“ und dann die gewünschte Stimme.

Informationen zum Einstellen der Geschwindigkeit, mit der die Sprachansage erfolgt, finden Sie unter „Sprechgeschwindigkeit Ansagenstimme“ weiter unten. Informationen zum Einstellen der Stimmhöhe der Ansagenstimme finden Sie unter „Stimmhöhe Ansagenstimme“ weiter unten.

Textfenster scannen

Wenn „Textfenster scannen“ aktiviert ist, wird beim Scannen auch das Textfenster einbezogen. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird das Textfenster beim Scannen übersprungen.

Leere Felder überspringen

Wenn „Leere Felder überspringen“ aktiviert ist, überspringt das Scanning nicht belegte Tastenfelder sowie Tastenfelder, die nur eine Sprachmitteilungsaktion, aber keinen Text enthalten. Wenn die Einstellung deaktiviert ist, werden Bereiche ohne Tasten in den Scan mit einbezogen.

Art des Scannings

Legt das Scanmuster auf „Sequenziell“ oder „Zeile/Spalte“ fest. Zur Auswahl des Scanmusters wählen Sie „Art des Scannings“ und dann „Sequenziell“ oder „Zeile/Spalte“.

Den sequenziellen Scan-Modus verwenden: Beim sequenziellen Scan werden die Tasten von links nach rechts durchlaufen, beginnend in der ersten Zeile. Wenn das gewünschte Tastenfeld hervorgehoben ist, aktivieren Sie die Taste.

Den Zeilen-/Spalten-Scanmodus verwenden: Beim Zeilen-/Spalten-Scan werden die einzelnen Tastenreihen hervorgehoben, beginnend mit der obersten Zeile und von oben nach unten. Wenn die Zeile mit dem gewünschten Tastenfeld hervorgehoben ist, aktivieren Sie die Taste. Der Scan durchläuft dann die einzelnen Tastenfelder von links nach rechts in der Zeile. Wenn das gewünschte Tastenfeld hervorgehoben ist, aktivieren Sie die Taste.

Manuelle Wiederholfrequenz

Hinweis: Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Auto-Scan ausgeschaltet und der Scan mit Gedrückthalten aktiviert ist.

Steuert die Geschwindigkeit, wenn Sie eine Taste gedrückt halten. Die verfügbaren Einstellungen reichen von 0,2 Sekunden bis 10 Sekunden.

Scan-Abbruch-Zeit

Hinweis: Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn „Auto-Scan“ deaktiviert ist.

Wenn Sie das Scannen mit zwei Tasten verwenden (Tastenkongfiguration auf 2 Tasten eingestellt), ist dies die Zeit, die Ihr Gerät wartet, bis es den Scan abbricht und von vorn beginnt. Beispiel: Sie bewegen sich mit Taste 1 durch das Scanmuster und gehen über das gewünschte Tastenfeld hinaus. Wenn die Scan-Abbruch-Zeit aktiviert ist, können Sie die eingestellte Zeit (z. B. 5 Sekunden) warten. Wenn Sie die Taste 2 in dieser Zeit nicht aktivieren, wird das Scanmuster wieder auf den Anfang zurückgesetzt.

Sprechgeschwindigkeit Ansagenstimme

Hier wird ein Schieberegler angezeigt, mit dem Sie die Geschwindigkeit der Ansagenstimme anpassen können. Um die Geschwindigkeit einzustellen, scrollen Sie zum Schieberegler „Sprechgeschwindigkeit Ansagenstimme“. Bewegen Sie den Schieberegler nach rechts für eine höhere Geschwindigkeit oder nach links für eine geringere Geschwindigkeit, bis die Ansagestimme mit der gewünschten Geschwindigkeit spricht.

Stimmhöhe Ansagestimme

Legt die Stimmhöhe der Ansagenstimme fest. Um die Stimmhöhe einzustellen, wählen Sie „Stimmhöhe Ansagestimme“ und die gewünschte Stimmhöhe. Die verfügbaren Einstellungen lauten „Niedrigste“, „Niedriger“, „Normal“, „Hoch“, „Höher“ und „Höchste“.

Pause zwischen Wörtern (Ansage-Scanning)

Wenn die Funktion „Ansage-Scanning“ aktiviert ist, legt die Option „Pause zwischen Wörtern“ die Zeitspanne zwischen den Wörtern in den Ansage-Prompts fest. Die verfügbaren Einstellungen lauten: Keine Pause, 1 Sekunde, 2 Sekunden und 3 Sekunden.

Scangeschwindigkeit

Hinweis: Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Auto-Scan aktiviert ist.

Legt fest, wie lange das Gerät braucht, um bei einem Scan von einem Tastenfeld, einer Zeile oder Spalte zur nächsten zu wechseln. Wählen Sie „Scangeschwindigkeit“ und dann die entsprechende Geschwindigkeit. Die verfügbaren Einstellungen reichen von 0,2 Sekunden bis 10 Sekunden. Wenn Sie z. B. 1,0 Sekunden auswählen, dauert ein Scan von der Hervorhebung eines Tastenfelds bis zur Hervorhebung des nächsten Tastenfelds eine Sekunde.

Zahl der Durchläufe

Hinweis: Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Auto-Scan aktiviert ist.

Legt fest, wie oft das Gerät die Seite automatisch scannt. Nachdem die eingestellte Anzahl von Durchgängen erreicht ist, wird der Scan angehalten, bis Sie erneut eine Taste aktivieren. Wählen Sie „Anzahl der Durchläufe“, und dann die gewünschte Anzahl der Durchläufe. Die verfügbaren Einstellungen lauten 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 und 100.

Stimmen und Ausspracheregeln

Beim erstmaligen Öffnen der App haben Sie eine Kombination aus Sprache und Stimme ausgewählt. Sie können Stimmen jederzeit hinzufügen, ersetzen oder anpassen.

Eine Stimme hinzufügen oder ersetzen

1. Wählen Sie Menü > Einstellungen, und scrollen Sie zum Abschnitt „Sprache“.
2. Wählen Sie die Sprach-/Stimmkombination aus, die Sie ändern möchten.
3. Wählen Sie Stimme, um eine Liste der verfügbaren Stimmen in der betreffenden Sprache zu öffnen.
 - Die zurzeit ausgewählte Stimme ist mit einem Häkchen gekennzeichnet.
 - Um sich eine Stimme anzuhören, wählen Sie das Wiedergabesymbol.
4. Wenn Sie die gewünschte Stimme gefunden haben, wählen Sie das Download-Symbol, um sie herunterzuladen und zu installieren.
5. Wählen Sie die neue Stimme aus, um die ursprüngliche Stimme zu ersetzen.

Spracheinstellungen anpassen

1. Wählen Sie Menü > Einstellungen, und scrollen Sie zum Abschnitt „Sprache“.
2. Wählen Sie die Sprach-/Stimmkombination aus, die Sie anpassen möchten.

Geschwindigkeit

Verwenden Sie den Schieberegler Geschwindigkeit, um die Sprechgeschwindigkeit zu ändern.

Stimmhöhe

Um die Stimmhöhe anzupassen, wählen Sie Stimmhöhe und dann den Wert Niedrigste, Niedriger, Niedrig, Normal, Hoch, Höher, Höchste. Diese Option ist nicht für alle Stimmen verfügbar.

Pause zwischen Wörtern

Um eine Verzögerung zwischen einzelnen Wörtern hinzuzufügen, wählen Sie Pause zwischen Wörtern und dann 1 Sekunde, 2 Sekunden oder 3 Sekunden. Wenn Sie keine Verzögerung zwischen Wörtern wünschen, wählen Sie Keine Pause. Diese Option ist nicht für alle Stimmen verfügbar.

Testen der Spracheinstellungen

Um sich anzuhören, wie die ausgewählte Stimme bei den aktuellen Einstellungen klingt, wählen Sie Test. Bei Bedarf können Sie die Spracheinstellungen mehrmals anpassen und jeweils Test wählen.

Wenn Sie alle Spracheinstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen und von vorn beginnen möchten, wählen Sie Standardwerte. Eine Meldung weist darauf hin, dass alle Spracheinstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt werden. Wenn Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen möchten, wählen Sie Weiter. Wenn Sie die aktuellen Einstellungen beibehalten möchten, wählen Sie Abbrechen.

Nachdem Sie die Spracheinstellungen geändert haben, wählen Sie den Rückwärtspfeil und dann das Häkchen .

Erstellen Ihrer Stimme mit The Voice Keeper

So erstellen Sie die Stimme:

1. Laden Sie die The Voice Keeper-App herunter oder besuchen Sie die The Voice Keeper-Website unter www.thevoicekeeper.com, und befolgen Sie die Anweisungen, um ein kostenloses Konto zu erstellen. Beachten Sie beim Aufnehmen Ihrer Stimme diese Tipps:
 - Fertigen Sie die Aufnahme in einem stillen, echolosen Raum an.
 - Sie können zwar eine eigene Stimme mit nur 75 Sätzen erstellen, aber die Aufnahme von mehr als 150 Sätzen erhöht die Sprachqualität. Je mehr Sie aufnehmen, desto besser wird Ihre synthetisierte Stimme.
 - Sprechen Sie natürlich. Versuchen Sie nicht, einen erzählerischen Tonfall anzunehmen oder eine besonders gute Aussprache zu verwenden. Seien Sie beim Lesen Sie selbst.
 - Wenn Sie einen Fehler machen, nehmen Sie den betreffenden Satz erneut auf.


Wenn Sie Hilfe beim Erstellen der Stimme benötigen, gehen Sie zur The Voice Keeper-Website, scrollen zum Ende der Webseite und wählen den Link Contact us (Kontakt), um den Support für The Voice Keeper zu erreichen.

2. Testen Sie Ihre Stimme in der App oder auf der Website von The Voice Keeper. Wenn Sie mit der Stimme zufrieden sind, befolgen Sie die Anweisungen unten, um die Stimme mit Ihrem Gerät zu verbinden.

So verbinden Sie die Stimme:

1. Wählen Sie Menü, wählen Sie Einstellungen, scrollen Sie zum Abschnitt „Sprache“, und wählen Sie Ihre Stimme, um die Spracheinstellungen zu öffnen.
2. Wählen Sie in den Spracheinstellungen die Stimme, um eine Liste der verfügbaren Sprachen zu öffnen.
3. Wählen Sie Eigene Stimme wählen, um eine Liste mit Optionen zu öffnen.


4. Wählen Sie The Voice Keeper.

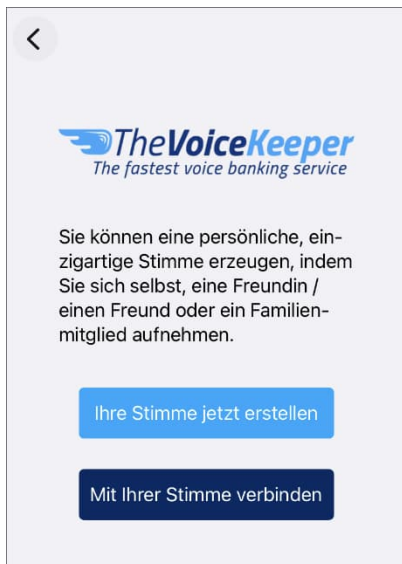

5. Wählen Sie Mit Ihrer Stimme verbinden, und befolgen Sie die Anweisungen.

Ihre VocaliD™-Stimme einrichten

1. Wählen Sie Menü, wählen Sie Einstellungen, scrollen Sie zum Abschnitt „Sprache“, und wählen Sie Ihre Stimme, um die Spracheinstellungen zu öffnen.
2. Wählen Sie in den Spracheinstellungen die Stimme, um eine Liste der verfügbaren Sprachen zu öffnen.
3. Wählen Sie Eigene Stimme wählen, um eine Liste mit Optionen zu öffnen.
4. Wählen Sie VocaliD Stimme.

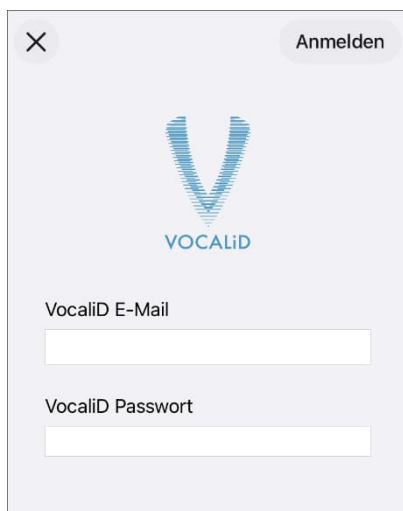

5. Geben Sie Ihre VocaliD-E-Mail-Adresse und Ihr VocaliD-Passwort ein.
6. Wählen Sie oben rechts Anmelden, um die Aufforderung „Stimme herunterladen“ zu sehen.
7. Wählen Sie Stimme herunterladen. Daraufhin wird das Fenster „Lade Stimme herunter“ angezeigt.
8. Wenn der Download abgeschlossen ist, wird die Meldung „Die neue Stimme wurde erfolgreich installiert“ angezeigt.
9. Wählen Sie OK.
10. Wählen Sie Fertig.
11. Testen Sie die Stimme, und passen Sie Geschwindigkeit und Tonhöhe nach Bedarf an.

Eine Apple Personal Voice erstellen

Auf Geräten mit iOS 17 oder höher können Sie eine persönliche Stimme erstellen: iPhone 12 oder höher; iPad Air (5. Generation); iPad Pro 11 Zoll (3. Generation) oder höher; iPad Pro 12,9 Zoll (5. Generation) oder höher. Diese Funktion ist derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Erstellen einer persönlichen Stimme

Es dauert mindestens 30 Minuten, um die Stimme zu trainieren, und dann 12 bis 24 Stunden, um sie auf dem iPad zu verarbeiten.

Hinweis: Die Verarbeitung wird unterbrochen, wenn Sie das iPad verwenden, bevor dieser Vorgang abgeschlossen ist. Möglicherweise möchten Sie der gemeinsamen Nutzung der Stimme auf allen Geräten zuzustimmen, die mit Ihrem Konto verbunden sind, damit Sie die Stimme in Zukunft nicht erneut erstellen müssen.

1. Öffnen Sie auf Ihrem Gerät die App Einstellungen.
2. Gehen Sie zu Bedienungshilfen > Eigene Stimme > Eigene Stimme erstellen.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine persönliche Stimme zu erstellen. Sie werden gebeten, 150 Sätze zu lesen, um die Stimme mit maschinellem Lernen zu trainieren.
4. Stellen Sie sicher, dass „Verwendungsanfrage durch Apps zulassen“ aktiviert ist, während Sie sich in „Barrierefreiheit/Eigene Stimme“ befinden.

Der App die Verwendung von Apple Personal Voice gestatten

Gehen Sie zu Einstellungen > Stimme > Benutzerdefinierte Stimmen > Apple Eigene Stimme. Gestatten Sie dann im Popup-Fenster den Zugriff auf die eigene Stimme. Wenn Sie diesen Zugriff auf die Stimme ablehnen, muss er in den iOS-Einstellungen wieder aktiviert werden.

Vergewissern Sie sich, dass Ihre eigene Stimme ganz oben in der Liste der Stimmen angezeigt wird

Nach der Genehmigung Ihrer eigenen Stimme sollte diese in der Liste der Stimmen an erster Stelle angezeigt werden. Ist dies nicht der Fall, starten Sie die App neu. Wenn sie angezeigt, aber nicht wiedergegeben wird, starten Sie den iPad neu.

Nachdem Ihre eigene Stimme aktiviert ist, sollte sie dieselben grundlegenden Funktionen wie jede andere Apple-Stimme haben.

Acapela-Stimmenlimit

Sobald im Sprachmenü die Obergrenze für Stimmen erreicht ist (d. h. eine Acapela-Stimme für zwei verschiedene Sprachen ausgewählt wurde), sollen die verfügbaren Acapela-Stimmen für die verbleibenden Sprachen weiterhin angezeigt werden.

Wenn Sie eine Acapela-Stimme auswählen, nachdem Sie zwei Acapela-Stimmen installiert haben:

1. Wählen Sie eine Acapela-Stimme aus. Die Stimme wird heruntergeladen, und es erscheint eine Meldung, die anzeigt, wo die Stimmen derzeit verwendet werden , und fragt: „Stimme ersetzen? Sie haben das Limit für Acapela-Stimmen erreicht. Bitte wählen Sie eine Stimme aus, die durch diese Stimme ersetzt werden soll.“
2. Wählen Sie den Namen der Stimme sowie das Gebietsschema aus. Die neue Stimme ersetzt die aktuell ausgewählte Stimme, sodass Sie festlegen können, welche Sprache Sie ersetzen möchten.
3. Die ersetzte Acapela-Stimme wechselt zur standardmäßigen Apple-Stimme.

Ausspracheregeln für Wörter

Bevor Sie die Aussprache eines Wortes ändern, vergewissern Sie sich, dass die gewünschte Stimme ausgewählt ist. Jeder Sprachsynthesizer hat ein eigenes Aussprache-Lexikon. Apple-Stimmen und Voice Keeper-/Almagu-Stimmen verfügen beispielsweise über separate Aussprache-Lexika.

Aussprache bearbeiten

1. Wählen Sie Menü und dann Aussprache bearbeiten.
2. Wählen Sie das Pluszeichen + oben rechts, um eine Aussprache hinzuzufügen.
3. Geben Sie das Wort ein und geben Sie dann die phonetische Aussprache an (wie es ausgesprochen werden soll).
4. Wählen Sie Anhören, um die Aussprache zu hören. Ändern Sie die Aussprache so oft wie nötig, bis das Wort wie gewünscht ausgesprochen wird.
5. Wählen Sie Sichern und .

Tipp: Informationen zum Ändern der Aussprache für eine bestimmte Taste finden Sie unter [Aussprache für eine Tastenmitteilung bearbeiten](#).

Eine alternative Aussprache löschen

1. Wählen Sie Menü und dann Aussprache bearbeiten.
2. Wählen Sie Bearbeiten. Vor jeder Aussprache wird ein rotes Symbol  angezeigt.
3. Wählen Sie das Symbol  vor dem Wort, das Sie löschen möchten.
4. Wählen Sie Löschen.
5. Wählen Sie .

Löschen aller phonetischen Aussprachen

Wichtig: Mit dieser Option werden alle phonetischen Aussprachen für die Stimme gelöscht.

1. Wählen Sie Menü und dann Aussprache bearbeiten.
2. Wählen Sie Löschen.
3. Wählen Sie Ja.

Standardaussprache wiederherstellen

Wichtig: Mit dieser Option werden nur die standardmäßigen (voreingestellten) phonetischen Aussprachen für die Stimme wiederhergestellt. Vom Benutzer hinzugefügte phonetische Aussprachen werden nicht wiederhergestellt.

1. Wählen Sie Menü und dann Aussprache bearbeiten.
2. Wählen Sie Rücksetzen.
3. Wählen Sie Ja.

Sprachpräferenzen einstellen

Sie können die App so konfigurieren, dass sie nach jedem Zeichen, Wort, Satz oder einer beliebigen Kombination dieser Einstellungen spricht. Wählen Sie Menü > Einstellungen, und scrollen Sie zum Abschnitt „Sprachausgabe“.

Zeichen sprechen

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird jedes Zeichen n gesprochen, sobald es eingegeben wurde.

Wort sprechen

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird jedes Wort gesprochen, sobald es eingegeben wurde.

Satz sprechen

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird jeder Satz gesprochen, sobald er eingegeben wurde.

Ausrichtungseinstellungen festlegen

Bildschirmausrichtung einstellen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die bevorzugte Ausrichtung Ihres iPad-Bildschirms zu fixieren.

1. Beenden Sie die Unity AAC-App.
2. Wischen Sie diagonal von der oberen rechten Ecke des iPads nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.
3. Wählen Sie das Symbol „Ausrichtungssperre“, um die bevorzugte Ausrichtung zu fixieren.

iPhone-Bildschirmausrichtung

Sie können eine bevorzugte Ausrichtung für die App auf Ihrem iPhone festlegen und den Bildschirm in dieser Position fixieren, oder Sie können die Einstellung „Display wird neu ausgerichtet“ verwenden, um zu ermöglichen, dass sich die Bildschirmausrichtung durch Bewegung des Telefons ändert.

Hinweis: Die Neigungseinstellungen sind nur verfügbar, wenn die App auf einem iPhone ausgeführt wird.

1. Wählen Sie Menü > Einstellungen, und scrollen Sie zum Abschnitt „Neigung“. Für jede Neigungsoption wird die aktuelle Einstellung angezeigt.
 - Mit Bevorzugte Ausrichtung können Sie die bevorzugte Bildschirmausrichtung je nach Ausrichtung des Telefons festlegen. Wenn Sie das Telefon im Hochformat halten, wird auf dem Bildschirm „Hochformat“ angezeigt. Wenn Sie das Telefon im Querformat halten, wird auf dem Bildschirm „Querformat“ angezeigt.
 - Mit Aktion beim Neigen des Geräts wird festgelegt, ob sich das Bewegen des Telefons auf die Bildschirmausrichtung auswirkt. Verfügbare Optionen sind „Display wird neu ausgerichtet“ und „Keine Aktion“.
2. Halten Sie das Telefon in der bevorzugten Ausrichtung (Hochformat oder Querformat), und wählen Sie Einstellen, um Ihre bevorzugte Ausrichtung festzulegen.

3. Wählen Sie auf dem Bildschirm „Einstellungen“ die Option Neigungsfunktion. Daraufhin werden die Optionen für „Aktion beim Neigen des Geräts“ angezeigt. Die aktuelle Auswahl ist mit einem Häkchen gekennzeichnet.

Wenn Display wird neu ausgerichtet ausgewählt ist, wird der Bildschirm automatisch neu ausgerichtet, wenn das Gerät bewegt wird.

Wenn Keine Aktion ausgewählt ist, bleibt der Bildschirm in derselben Ausrichtung gesperrt, wenn Sie das Gerät bewegen.

4. Sperren Sie den Bildschirm in Ihrer bevorzugten Ausrichtung, oder lassen Sie zu, dass sich die Ausrichtung ändert, wenn Sie das Telefon bewegen.

Beispiel: Wenn Sie den Bildschirm unabhängig von der Drehung des Telefons im Querformat ausrichten möchten, halten Sie das Telefon im Querformat und wählen Keine Aktion, um den Bildschirm zu sperren.

Zugriff auf Bearbeitungsmenüs einschränken

Es kann vorkommen, dass Sie den Zugriff auf die Bearbeitungsmenüs (Einstellungen und Vokabular) blockieren müssen. Dazu kann die Einstellung Menü mit Passwort entsperren aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können die Menüs (Einstellungen und Vokabular) nur durch Eingabe eines Passworts aufgerufen werden.

So schützen Sie die Bearbeitungsmenüs mit einem Passwort:

1. In der App wählen Sie Menü. > Einstellungen und scrollen zum Abschnitt „Menüsperre“.
2. Wählen Sie das Feld „Passwort Menüsperre“, um eine Tastatur zu öffnen.
3. Geben Sie Ihr Passwort ein, und wählen Sie auf der Tastatur Fertig.
4. AKTIVIEREN Sie Menü mit Passwort entsperren.
5. Wählen Sie das Häkchen  im Menü „Einstellungen“. Wenn der Benutzer nun entweder Menü oder Vokabular auswählt, wird eine Aufforderung zur Eingabe des Passworts angezeigt.

So setzen Sie Ihr Passwort zurück:

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, geben Sie 72584556 ein, um das vorhandene Passwort zu überschreiben. Dann können Sie ein neues Passwort erstellen.

So entfernen Sie den Passwortschutz aus den Bearbeitungsmenüs:

1. Wählen Sie in der App Menü oder Vokabular. Daraufhin wird die Aufforderung zur Eingabe des Passworts angezeigt.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein. Das Menü „Einstellungen“ wird geöffnet.
3. Deaktivieren Sie die Option Menü mit Passwort entsperren.
4. Um das Passwort zu entfernen, tippen Sie in das Feld „Passwort Menüsperre“, um die Tastatur zu öffnen. Drücken Sie die Rücktaste  auf der Tastatur, um das Passwort zu entfernen.
5. Wählen Sie das Häkchen auf der Tastatur.
6. Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ die Option .

Mit Vokabulardateien arbeiten

Hinweis: Die Vokabulardateien werden einzeln aufgelistet, wenn Sie „Neues Vokabular auswählen“ wählen.

Eine Vokabulardatei wählen

1. Wählen Sie Vokabular und dann Vokabular auswählen. Die daraufhin angezeigte Seite enthält eine Liste der verfügbaren Vokabulardateien.

Benutzerdefinierte Dateien werden unter „Meine Dateien“ gezeigt. Die ursprünglichen Dateien sind nach Sprache geordnet. Um sicherzustellen, dass Sie mit der neuesten Version einer Vokabulardatei arbeiten, sehen Sie sich das Änderungsdatum und die Uhrzeit hinter dem Namen des Vokabulars an. Ein Häkchen gibt an, dass die Vokabulardatei bereits zuvor ausgewählt wurde.

Bearbeiten		Menü
Q		
▼ Meine Dateien		
Unity Español 84 Secuenciado Copiar Verändert 28. März 2026 um 8:16 AM		Spanisch (Vereinigte Staaten)
Unity Español 84 1-Toque Copiar Verändert 29. März 2026 um 9:32 AM		Spanisch (Vereinigte Staaten)
Unity 84 Sequenced Copy Verändert 28. März 2026 um 6:54 AM		Englisch (Vereinigte Staaten)
Unity 60 Wortstrategie Kopieren Verändert 3. April 2026 um 12:09 PM		Deutsch (Deutschland) ✓
▶ Deutsch		
▶ Englisch		
▶ Spanisch		
Unity – Version 2026.2.0 (6)		

Tipp: Sie können entweder scrollen, um alle verfügbaren Vokabulare zu sehen, oder nach einer bestimmten Datei suchen. Um nach einer Datei zu suchen, ziehen Sie die Liste nach unten, um das Suchsymbol  und die Suchleiste über der Liste anzuzeigen. Wählen Sie die Suchleiste, um eine Tastatur zu öffnen und einen vollständigen oder teilweisen Vokabularnamen einzugeben.

2. Wählen Sie die zu ladende Vokabulardatei aus.
3. Nach dem Laden können Sie die Anordnung der Seiten und Tasten erkunden, indem Sie die Tasten auswählen. Tasten mit Pfeilen führen zu neuen Seiten.

Hinweis: Wenn Sie eine Vokabulardatei anpassen möchten, müssen Sie diese zunächst kopieren. Siehe [Eine Vokabulardatei kopieren](#).

Eine Vokabulardatei kopieren

Wenn Sie eine Vokabulardatei anpassen möchten, müssen Sie zunächst eine Kopie der Datei anfertigen. Nachdem Sie eine Kopie erstellt haben, können Sie die Kopie bearbeiten. Dadurch bleibt die Originaldatei erhalten, falls sie später wieder benötigt wird.

1. Wählen Sie eine Originalvokabulardatei aus der Bibliothek aus.
2. Wählen Sie Anpassen. Das Fenster „Vokabular kopieren“ wird geöffnet.
3. Fügen Sie einen neuen Titel und eine neue Beschreibung für die kopierte Vokabulardatei hinzu.
4. Wählen Sie Sichern.

Hinweis: Kopierte Vokabulardateien werden automatisch unter „Meine Dateien“ oben in der Übersicht der Vokabulare angezeigt. Alle anderen Vokabulardateien sind nach Sprache geordnet.

Eine neue leere Vokabulardatei erstellen

1. Wählen Sie Vokabular und dann Vokabular auswählen.
2. Wählen Sie Menü und dann Neues Vokabular erstellen.
3. Geben Sie einen Titel und eine Beschreibung für die neue Vokabulardatei ein.
4. Wählen Sie Sichern.
5. Suchen Sie die neu erstellte Datei in der Liste der verfügbaren Vokabulare, und wählen Sie die Datei, um sie zu öffnen.
6. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten. Eine Seite mit freien Positionen wird geöffnet.

7. Wählen Sie Menü und dann Seitenlayout bearbeiten.
8. Legen Sie die Anzahl der Tasten auf der Seite fest, indem Sie die Anzahl der Zeilen und Spalten auswählen.
9. Wählen Sie den ersten leeren Platz aus und beginnen Sie mit der Erstellung von Tasten.
10. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig. Jetzt haben Sie die erste Seite Ihres neuen Vokabulars erstellt.

Eine benutzerdefinierte Vokabulardatei umbenennen

Sie können nur benutzerdefinierte Vokabulardateien umbenennen, die unter „Meine Dateien“ oben in der Übersicht der Vokabulare angezeigt werden.

1. Wählen Sie Vokabular und dann Vokabular auswählen. Die daraufhin angezeigte Seite enthält eine Liste der verfügbaren Vokabulardateien.
2. Wählen Sie oben links auf der Seite Bearbeiten. Für jede benutzerdefinierte Vokabulardatei wird ein rotes Symbol  angezeigt.
3. Wählen Sie das rote Symbol  neben der Datei, die Sie umbenennen möchten. Die Tasten „Umbenennen“ und „Löschen“ werden angezeigt.
4. Wählen Sie Umbenennen. Daraufhin wird das Fenster „Umbenennen“ geöffnet.
5. Wählen Sie das Namensfeld, um die Tastatur zu öffnen.
6. Geben Sie den neuen Namen ein, wählen Sie Sichern und dann auf Fertig.

Eine benutzerdefinierte Vokabulardatei löschen

Sie können nur benutzerdefinierte Vokabulardateien löschen, die unter „Meine Dateien“ oben in der Übersicht der Vokabulare gespeichert sind.

1. Wählen Sie Vokabular und dann Vokabular auswählen. Die daraufhin angezeigte Seite enthält eine Liste der verfügbaren Vokabulardateien.
2. Wählen Sie oben links auf der Seite Bearbeiten. Für jede benutzerdefinierte Vokabulardatei wird ein rotes Symbol  angezeigt.
3. Wählen Sie das rote Symbol  neben der Datei, die Sie löschen möchten. Die Tasten „Umbenennen“ und „Löschen“ werden angezeigt.

4. Wählen Sie Löschen und dann auf Weiter in der Mitteilung „Vokabular löschen“.

Hinweis: Wenn Sie nicht die Absicht hatten, diese Vokabulardatei zu löschen, wählen Sie Abbruch.

5. Wählen Sie Fertig.

Hinweis: Um zu verhindern, dass Sie versehentlich eine benutzerdefinierte Datei löschen, wählen Sie Menü > Einstellungen und scrollen Sie zum Abschnitt „Menüsperre“. Stellen Sie sicher, dass die Option Vokabulare löschen erlauben deaktiviert ist. Aktivieren Sie diese Einstellung nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie eine bestimmte benutzerdefinierte Vokabulardatei löschen möchten.

Die Sprache einer Vokabulardatei ändern

Sie können nur benutzerdefinierte Vokabulardateien ändern, die unter „Meine Dateien“ oben in der Übersicht der Vokabulare gespeichert sind.

1. Wählen Sie Vokabular und dann Vokabular auswählen. Die daraufhin angezeigte Seite enthält eine Liste der verfügbaren Vokabulardateien.
2. Wählen Sie oben links auf der Seite Bearbeiten. Für jede benutzerdefinierte Vokabulardatei wird ein rotes Symbol  angezeigt.
3. Wählen Sie das rote Symbol  neben der Datei, deren Sprache geändert werden soll. Die Tasten „Umbenennen“ und „Löschen“ werden angezeigt.
4. Wählen Sie Umbenennen. Daraufhin wird das Fenster „Umbenennen“ geöffnet.
5. Wählen Sie das Feld „Sprache“. Es wird eine Liste mit Sprachen angezeigt.
6. Wählen Sie die gewünschte Sprache für das Vokabular aus.
7. Wenn Sie nur die Sprache des Vokabulars ändern möchten, lassen Sie den Namen der Vokabulardatei unverändert. Wenn Sie sowohl die Sprache als auch den Namen des Vokabulars ändern möchten, geben Sie einen neuen Namen für das Vokabular ein.
8. Wählen Sie Sichern und Fertig.

Automatische Datensicherungen für benutzerdefinierte Dateien

Hinweise:

- Diese Funktion wurde mit der Softwareversion 2025.5 hinzugefügt.
- Sie benötigen eine WLAN-Verbindung, um Dateien in einem Cloud-Dienst zu sichern.
- Dieser Prozess erstellt automatisch eine Sicherungskopie einer benutzerdefinierten Vokabulardatei, sobald Sie diese bearbeiten.
- Eine Sicherungskopie speichert die drei neuesten Versionen einer Datei.

Falls Sie noch keine automatischen Datensicherungen für benutzerdefinierte Dateien eingerichtet haben oder diesen Schritt beim ersten Öffnen der App übersprungen haben, befolgen Sie die nachstehende Anleitung.

Automatische Sicherung einrichten

1. Wählen Sie in der App Vokabular und dann Vokabular auswählen.
2. Wählen Sie Menü und Automatische Sicherung.
3. Geben Sie einen Namen für den Sicherungs-Ordner ein und wählen Sie Sichern.

Hinweis: Sie müssen einen Verzeichnisnamen eingeben und speichern, bevor Sie fortfahren können. Geben Sie nur Buchstaben und Zahlen ein; keine Sonder- oder Leerzeichen.


4. Wählen Sie einen Cloud-Dienst aus, der mit der App verknüpft werden soll.

The screenshot shows the 'Automatische Sicherung' (Automatic Backup) settings screen. At the top, there are three buttons: 'Sicherung' (Backup), 'Automatische Sicherung' (Automatic Backup), and 'Fertig' (Done). Below these, there is a section titled 'Name des Sicherungsordners' (Backup folder name) with a text input field containing 'Alex'. Below that is a section titled 'Dienst' (Service) with a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing options: 'Keine' (None) with a checkmark, 'iCloud', 'Google Drive', and 'Dropbox'. Below the dropdown is a section titled 'Sicherungen' (Backups) with a text input field containing 'Kein Dienst aus' (No service from). At the bottom, there is a section titled 'Rechtliches' (Legal) with a right arrow button.

5. Melden Sie sich beim Cloud-Dienst an. Sie sollten nun zur Vokabularliste auf Ihrem Gerät zurückkehren.
6. Wenn Sie eine erste Sicherungskopie aller aktuell auf dem Gerät befindlichen benutzerdefinierten Vokabulardateien erstellen möchten, wählen Sie die blaue Taste Sicherung oben im Fenster.
7. Jedes Mal, wenn Sie ein benutzerdefiniertes Vokabular bearbeiten, werden die Änderungen automatisch im Verzeichnis für automatische Sicherungen gespeichert.

Eine benutzerdefinierte Datei wiederherstellen

Wenn eine Datei im Order für die automatische Sicherung gespeichert wird, wird hinter dem Dateinamen „Wiederherstellen“ angezeigt. Um eine benutzerdefinierte Datei in Ihrer Vokabularliste wiederherzustellen, wählen Sie Wiederherstellen.

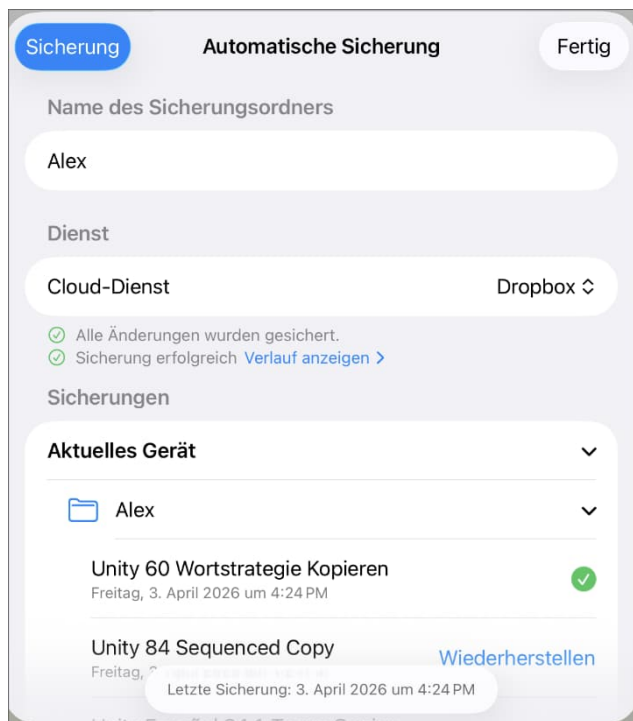

Wenn die Datei in Ihrer Vokabularliste wiederhergestellt wird, wird im Verzeichnis für die automatische Datensicherung nach dem Dateinamen ein Häkchen anstelle von „Wiederherstellen“ angezeigt.

Vokabulardateien übertragen oder sichern

In den folgenden Abschnitten werden verschiedene Methoden zum Exportieren von benutzerdefinierten Dateien zum Speichern als Sicherungskopien oder zum Übertragen von benutzerdefinierten Dateien von einem Gerät auf ein anderes sowie Methoden zum Importieren der Dateien zurück auf ein Gerät beschrieben.

Eine Datei mit AirDrop®, Google Drive™ oder per E-Mail exportieren

1. Wählen Sie in Unity AAC Vokabular und dann Vokabular auswählen.
2. Wählen Sie Menü und anschließend Vokabular importieren/exportieren.
3. Wählen Sie Exportieren/Teilen.
4. Wählen Sie die zu exportierende Vokabulardatei aus.
5. Wählen Sie Fertig, und wählen Sie die gewünschte Freigabemethode für die Datei.
 - AirDrop: Bluetooth® und Wi-Fi® müssen aktiviert sein. Sie erkennen in der Nähe befindliche Geräte, auf denen AirDrop aktiviert ist und die Ihre Datei akzeptieren können. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus.
 - Google Drive: Erfordert die Einrichtung von Google Drive auf dem Gerät und den Zugriff auf ein WLAN.
 - E-Mail: Erfordert ein auf dem Gerät eingerichtetes E-Mail-Konto und Zugriff auf ein WLAN.


Eine Vokabulardatei zu Dropbox® exportieren

Hinweis: Sie benötigen ein Dropbox-Konto. Es muss eine WLAN-Verbindung bestehen, oder Sie müssen die Dropbox-App auf Ihrem Gerät haben.

1. Wählen Sie in Unity AAC Vokabular und dann Vokabular auswählen.
2. Wählen Sie Menü und anschließend Vokabular importieren/exportieren.
3. Wählen Sie DropBox.
4. Wählen Sie In Dropbox exportieren.
5. Melden Sie sich bei Dropbox an.
6. Wählen Sie die zu exportierende Vokabulardatei aus.
7. Wählen Sie Upload. Wenn die Meldung „Hochladen abgeschlossen“ angezeigt wird, wählen Sie OK.

Eine Vokabulardatei zu iTunes® exportieren

1. Schließen Sie das Gerät an den Computer an.
2. Öffnen Sie iTunes auf dem Computer.
3. Wählen Sie in Unity AAC Vokabular und dann Vokabular auswählen.
4. Wählen Sie Menü, Vokabular importieren/exportieren und anschließend Zu iTunes exportieren.
5. Wählen Sie im daraufhin angezeigten Menü die zu exportierende Vokabulardatei aus, und wählen Sie Sichern.
6. Klicken Sie in iTunes auf dem Computer auf das kleine Gerätesymbol oben links im Fenster.

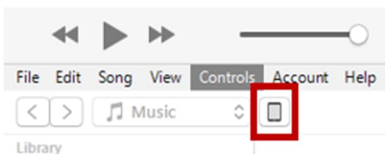

7. Wählen Sie links im daraufhin angezeigten Fenster auf Dateifreigabe.
8. Wählen Sie in der Spalte „Apps“ die Unity-App aus.

9. Wählen Sie in der Spalte unter Unity-Dokumente die zu exportierende Vokabulardatei aus.
10. Klicken Sie unten rechts auf Sichern. Daraufhin wird das Fenster „Speichern“ geöffnet.
11. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem Sie die Datei speichern möchten, und wählen Sie Verzeichnis auswählen.
12. Klicken Sie auf Fertig, und beenden Sie iTunes.

Vokabulardateien von Ihrem Gerät auf ein USB-Laufwerk exportieren

1. Schließen Sie das USB-Laufwerk an Ihr Gerät an.
2. Wählen Sie in Unity AAC Vokabular und dann Vokabular auswählen.
3. Wählen Sie Menü und anschließend Vokabular importieren/exportieren.
4. Wählen Sie Exportieren/Teilen.
5. Wählen Sie die zu exportierende Vokabulardatei aus.
6. Benennen Sie die Datei gegebenenfalls um, und wählen Sie .
7. Wählen Sie In Dateien sichern.
8. Wählen Sie das USB-Laufwerk aus.
9. Wählen Sie oben rechts Sichern. Die Vokabulardatei wird jetzt auf dem USB-Laufwerk gespeichert.

Eine Datei von einem USB-Laufwerk auf Ihr Gerät importieren

1. Schließen Sie das USB-Laufwerk an, das die Vokabulardateien enthält, die auf das Gerät importiert werden sollen.
2. Wählen Sie in Unity AAC Vokabular und dann Vokabular auswählen.
3. Wählen Sie Menü und anschließend Vokabular importieren/exportieren.
4. Wählen Sie Import aus Datei.

Hinweis: Die auf dem USB-Laufwerk gespeicherten Dateien werden in einem Dateifenster angezeigt. Sie können nur Dateien im Format .ce, .prt, .wf oder pvf auswählen.*

5. Wählen Sie die Datei aus, die Sie auf Ihr Gerät importieren möchten.

Hinweis: Das Dateifenster wird geschlossen, und die Informationen zur Importdatei sollten auf dem Bildschirm „Vokabular importieren“ angezeigt werden. Der Name des Vokabulars wird angezeigt.

6. Bearbeiten Sie die Dateiinformationen nach Bedarf.
7. Wählen Sie die Taste Importieren. Die Datei wird in die Vokabularbibliothek auf dem Gerät importiert.

Mehrere Vokabulardateien von einem USB-Laufwerk auf Ihr Gerät importieren

1. Schließen Sie das USB-Laufwerk an, das die Vokabulardateien enthält, die auf das Gerät importiert werden sollen.
2. Wählen Sie in Unity AAC Vokabular und dann Vokabular auswählen.
3. Wählen Sie Menü und anschließend Vokabular importieren/exportieren.
4. Wählen Sie Import aus Datei.

Hinweis: Die auf dem USB-Laufwerk gespeicherten Dateien werden in einem Dateifenster angezeigt. Sie können nur Dateien im Format .ce, .prt, .wf oder pvf auswählen.

Wichtig: Die Taste „Auswählen“ sollte angezeigt werden. Alternativ kann sich die Taste „Auswählen“ in einem Menü mit einem Symbol befinden, das einen Kreis mit drei Punkten zeigt. Dies hängt von der Bildschirmgröße und -ausrichtung des Geräts ab.

Wenn an dem geöffneten Speicherort nicht mehrere importierbare Dateien angezeigt werden, ist die Taste „Auswählen“ möglicherweise nicht verfügbar, selbst wenn Sie zu einem Speicherort navigieren, der mehrere Dateien enthält. In diesem Fall können Sie zuerst den Speicherort auswählen, an dem mehrere Dateien vorhanden sind, dann Abbrechen wählen und das Fenster „Import aus Datei“ erneut öffnen.

5. Wählen Sie die Taste Auswählen, um den Auswahlmodus für mehrere Dateien zu starten.
6. Wählen Sie alle zu importierenden Dateien aus, oder wählen Sie die Taste Alle auswählen.
7. Wählen Sie nach der Auswahl der Dateien Öffnen, um sie für den Import vorzubereiten.

Hinweis: Wenn Sie die Taste „Fertig“ wählen, wird der Auswahlmodus für mehrere Dateien abgebrochen.

8. Wenn Sie Öffnen wählen, wird das Dateifenster geschlossen, und alle ausgewählten Dateien sollten auf dem Bildschirm „Vokabular importieren“ angezeigt werden.
9. Wählen Sie die Datei(en) aus der Liste aus. Ausgewählte Dateien werden mit einem Häkchen gekennzeichnet.
10. Bearbeiten Sie die Dateiinformationen nach Bedarf.
11. Wählen Sie die Taste Importieren. Die Dateien werden in die Vokabularbibliothek auf dem Gerät importiert.
 - Nach dem Import wird die betreffende Datei aus der Liste der zu importierenden Dateien entfernt.
 - Dateien können durch Wischen nach links aus der Importliste entfernt werden.
 - Wenn Sie die Taste „Fertig“ wählen, werden alle verbleibenden Dateien, die nicht importiert wurden, aus der Liste entfernt und nicht importiert. Danach wird der Bildschirm geschlossen.
 - Nachdem die letzte Datei importiert wurde, wird der Bildschirm „Vokabular importieren“ automatisch geschlossen.


Sprachen hinzufügen oder entfernen

Beim erstmaligen Öffnen der App haben Sie eine Kombination aus Sprache und Stimme ausgewählt. Sie können Sprachen hinzufügen oder entfernen.

Wichtig: Nur vollständig unterstützte Sprachen verfügen über eigene Vokabulardateien. Durch das Hinzufügen einer nicht unterstützten Sprache können Sie zwar ein neues Vokabular in dieser Sprache erstellen, es werden jedoch keine Originalinhalte angezeigt.

Sprache/Region hinzufügen

1. Wählen Sie Vokabular und dann Vokabular auswählen. Daraufhin wird die Übersicht der Vokabulare geöffnet.
2. Wählen Sie Menü und dann Sprache & Region aus. Im Fenster „Sprache & Region“ werden die Sprachen angezeigt, für die es aktuell Vokabulare gibt.
3. Wählen Sie das Pluszeichen + oben rechts, um eine Liste aller verfügbaren Sprachen/Regionen anzuzeigen.
4. Wählen Sie eine oder mehrere Sprachen/Regionen aus, die Sie hinzufügen möchten.

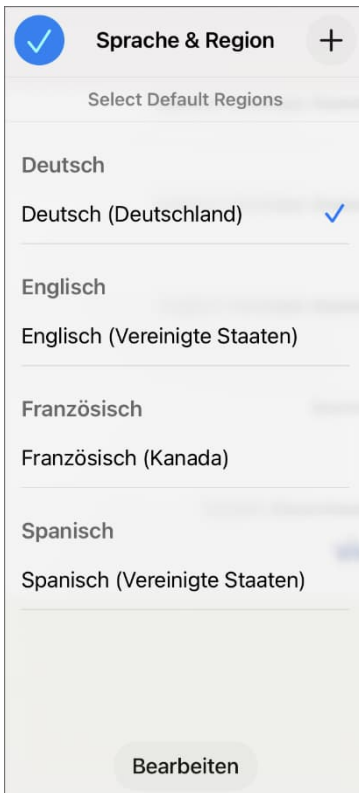

5. Wählen Sie das Häkchen  aus. Daraufhin wird die Sprache der Liste hinzugefügt. Wählen Sie die Sprache aus der Liste aus, um die verfügbaren Vokabulardateien für diese Sprache anzuzeigen.

Wählen Sie Ihre Stimme für die betreffende Sprache/Region

1. Wählen Sie im Vokabular Menü > Einstellungen und scrollen Sie zum Abschnitt „Sprache“.
2. Wählen Sie die Sprache/Region aus, für die Sie eine neue Stimme auswählen möchten.

Hinweis: Die Standardstimme wird rechts neben der Sprache/Region angezeigt.

3. Wählen Sie oben im Stimmfenster die Standardstimme aus, um eine Liste der für diese Sprache verfügbaren Stimmen zu öffnen.


4. Wählen Sie die Taste „Abspielen“ neben einer Stimme, um eine Hörprobe anzuhören. Wählen Sie eine Stimme aus der Liste aus.

Hinweis: Sie können auch Ihre eigene Stimme erstellen, indem Sie die Option „Eigene Stimme wählen“ am Ende der Liste wählen.

5. Wählen Sie den Zurück-Pfeil, um zum Einstellungsfenster zurückzukehren. Wählen Sie anschließend das Häkchen  aus.

Eine Sprache entfernen

1. Wählen Sie Vokabular und dann Vokabular auswählen. Daraufhin wird die Übersicht der Vokabulare geöffnet.
2. Wählen Sie Menü und dann Sprache & Region aus. Im Fenster „Sprache & Region“ werden die Sprachen angezeigt, für die es aktuell Vokabulare gibt.
3. Wählen Sie Bearbeiten. Vor jeder Sprache/Region erscheint ein rotes Symbol.

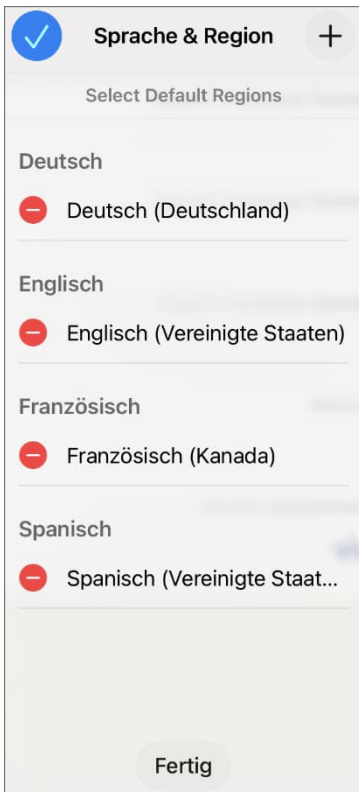

4. Wählen Sie das rote Symbol neben der Sprache/Region, die Sie löschen möchten. Die Taste „Löschen“ wird angezeigt.
5. Wählen Sie Löschen.
6. Wählen Sie an der Eingabeaufforderung Ja, um die Vokabularsprache zu löschen, oder wählen Sie Nein, wenn Sie die Sprache nicht zusammen mit allen zugehörigen Vokabulardateien und Stimmen löschen möchten.
7. Wählen Sie Fertig. Wählen Sie anschließend das Häkchen  aus.

Textfenster

Das Textfenster zeigt Text an, den Sie in der App eingeben oder generieren.

Textgröße im Textfenster vergrößern

1. Wählen Sie Menü > Einstellungen, und scrollen Sie zum Abschnitt „Textfenster“.
2. Wählen Sie unter „Schriftgröße“ eine größere Schriftgröße aus. Die Schriftgrößen reichen von 14 bis 72 Punkt.

Eine Textfenster-Aktion zum Vergrößern des Textes erstellen

1. Wählen Sie Menü > Einstellungen, und scrollen Sie zum Abschnitt „Textfenster“.
2. Wählen Sie unter „Textfenster-Aktion“ die Option Sprechen und Maximieren.
3. Wählen Sie das Textfenster erneut aus, um das vergrößerte Fenster zu schließen.

Die Anzahl der Zeilen für Text im Textfenster erhöhen

1. Wählen Sie Menü > Einstellungen, und scrollen Sie zum Abschnitt „Textfenster“.
2. Wählen Sie unter „Anzahl der Zeilen“ die Anzahl der Textzeilen aus, die im Textfenster angezeigt werden sollen. Die Anzahl der Zeilen variiert zwischen 1 und 10.

Hinweis: Wenn Sie versuchen, eine Schriftgröße und eine Zeilenanzahl auszuwählen, die zusammen dazu führen würden, dass das Textfenster größer ist als der Bildschirm, wird die Schriftgröße automatisch auf einen Wert reduziert, der bewirkt, dass das Textfenster nicht mehr als 60 % des Bildschirms einnimmt. Wenn Sie beispielsweise 10 Zeilen mit einer Schriftgröße von 72 Punkt auswählen, wird die Schriftgröße verkleinert.

Textfenster nach dem Sprechen automatisch löschen

Verwenden Sie die Einstellung „Auto Clear“ (Automatisch löschen), um das Textfenster nach dem Sprechen automatisch zu löschen.

1. Wählen Sie Menü > Einstellungen, und scrollen Sie zum Abschnitt „Sprachausgabe“.
2. Wählen Sie Textfenster automatisch löschen. Die Optionen zum automatischen Löschen werden angezeigt.

Aus: Das Textfenster wird nach dem Sprechen nicht automatisch gelöscht.

Sofort: Das Textfenster wird automatisch gelöscht, nachdem Sie den im Textfenster angezeigten Text gesprochen haben.

Mit der nächsten Eingabe: Das Textfenster wird automatisch gelöscht, nachdem Sie den im Textfenster angezeigten Text gesprochen und dann zusätzlichen Text eingegeben haben.

3. Wählen Sie das Häkchen  aus.


Gesprochenes Wort hervorheben

Um die Lese- und Schreibkompetenz zu verbessern, können Benutzer mit der Einstellung „Gesprochenes Wort hervorheben“ die gesprochenen Wörter im Textfenster hervorheben lassen. Wenn Sie eine Farbe auswählen, werden Wörter beim Sprechen im Textfenster in dieser Farbe nacheinander hervorgehoben.

Hinweis:

- Die Einstellung „Gesprochenes Wort hervorheben“ ist nur mit Apple-Stimmen verfügbar.
 - Das Hervorheben von Wörtern ist deaktiviert, wenn Scanaufforderungen gesprochen werden. Es ist jedoch aktiviert, wenn mit gescannten Tastenfunktionen Text zum Textfenster hinzugefügt wird.
1. Wählen Sie Menü > Einstellungen, und scrollen Sie zum Abschnitt „Textfenster“.
 2. Wählen Sie Gesprochenes Wort hervorheben. Daraufhin wird die Einstellung „AUS“ und eine Liste der Farben geöffnet. Die Standardeinstellung lautet „AUS“.

3. Wählen Sie eine Farbe aus.
4. Wählen Sie das Häkchen  aus.
5. Wenn Sie Wörter auf einer Seite auswählen, werden diese im Textfenster in der von Ihnen ausgewählten Farbe nacheinander hervorgehoben.

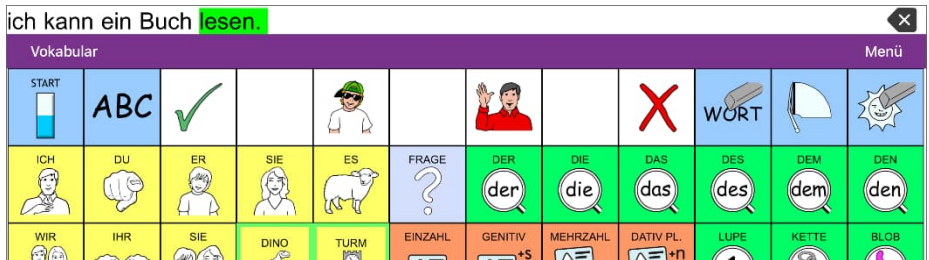

- Um die Hervorhebungsfarbe zu ändern, wählen Sie Menü > Einstellungen, scrollen zum Abschnitt mit dem Textfenster, wählen Gesprochenes Wort hervorheben, wählen eine andere Farbe und wählen dann .
- Wenn Sie die Sprachwiedergabe anhalten, bleibt das zuletzt gesprochene Wort hervorgehoben.
- Um die Hervorhebung auszuschalten, wählen Sie Menü > Einstellungen, scrollen zum Abschnitt mit dem Textfenster, wählen Gesprochenes Wort hervorheben und dann AUS und wählen dann .

Gesprochene Wörter bei Telefonaten/in FaceTime hervorheben

Um die Lese- und Schreibkompetenz zu verbessern, können Benutzer mit der Einstellung „Hervorhebungsfarbe Telefon/FaceTime“ Wörter, die während eines Telefonanrufs gesprochen wurden, hervorgehoben sehen. Diese Funktion hilft dem Gerätebenutzer zu erkennen, dass seine Mitteilung von seinem Gesprächspartner gesprochen und empfangen wurde.

Hinweis: Die Einstellung „Gesprochenes Wort hervorheben“ ist nur mit Apple-Stimmen verfügbar.

1. Wählen Sie Menü > Einstellungen, und scrollen Sie zum Abschnitt „Textfenster“.
2. Wählen Sie Hervorhebungsfarbe Telefon/FaceTime. Daraufhin wird die Einstellung „AUS“ und eine Liste der Farben geöffnet.

3. Wählen Sie eine Farbe aus. Die ausgewählte Farbe wird in der Einstellung angezeigt.
4. Wählen Sie .
5. Wenn Sie Wörter während eines Telefonanrufs auswählen, werden diese im Textfenster in der von Ihnen ausgewählten Farbe nacheinander hervorgehoben.
 - Um die Hervorhebungsfarbe zu ändern, wählen Sie Menü > Einstellungen, scrollen zum Abschnitt mit dem Textfenster, wählen Hervorhebungsfarbe Telefon/FaceTime, wählen eine andere Farbe aus und wählen dann .
 - Um die Hervorhebung auszuschalten, wählen Sie Menü > Einstellungen, scrollen zum Abschnitt mit dem Textfenster, wählen Hervorhebungsfarbe Telefon/FaceTime und dann AUS und wählen dann .

Mit einer Kombination aus Stimmen/Sprachen sprechen

Sie könnten zum Beispiel Englisch, Spanisch und kanadisches Französisch im selben Satz sprechen.

1. Öffnen Sie ein englisches Vokabular und geben Sie ein paar Wörter in das Textfenster ein.
2. Öffnen Sie ein spanisches Vokabular und geben Sie ein paar Wörter in das Textfenster ein.
3. Öffnen Sie ein französisches Vokabular (Kanada) und geben Sie ein paar Wörter in das Textfenster ein
4. Wählen Sie das Textfenster aus. Es werden englische, spanische und kanadisch-französische Wörter gesprochen. Wörter derselben Sprache fließen wie ein Satz, zwischen Wörtern verschiedener Sprachen entsteht eine kurze Pause.

Wortvorhersage

Die Wortvorhersage verbessert Ihre Kommunikationsfähigkeit, indem sie ein Wort, das Sie buchstabenweise eingeben, „vorhersagt“, wodurch sich die Anzahl der einzugebenden Buchstaben verringert.

Wenn Sie den ersten Buchstaben auf der Tastatur eingeben, zeigt die App-Software eine Liste von Wörtern an, die mit diesem Buchstaben beginnen. Wenn Sie weitere Buchstaben eingeben, wird die Liste entsprechend aktualisiert. Wenn das gewünschte Wort angezeigt wird, können Sie es durch einmaliges Tippen auswählen, um es im Textfenster anzuzeigen. Die App-Software sagt dann das nächste Wort voraus, das Sie eingeben möchten.

Art der Vorhersage festlegen

Es stehen zwei Arten der Wortvorhersage zur Verfügung: „Lernend + statisch“ und „Nur statisch“. Sie können angeben, welche Art der Wortvorhersage verwendet werden soll, oder Sie können die Wortvorhersage deaktivieren.

1. Wählen Sie Menü > Einstellungen, und scrollen Sie zum Abschnitt „Vorhersage“.
2. Wählen Sie Art der Vorhersage aus. Das Untermenü „Vorhersage“ wird geöffnet. Die aktuelle Einstellung ist mit einem Häkchen gekennzeichnet.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Lernendes + festes Lexikon: Die Wortvorhersage beinhaltet die Möglichkeit, Wörter zu lernen und dem großen Wortvorhersage-Wörterbuch hinzuzufügen. Die Einstellungen, die für das Lernen gelten, sind verfügbar.

Festes Lexikon: Bei der Wortvorhersage wird das große Wortvorhersage-Wörterbuch verwendet. Die Einstellungen, die für das Lernen gelten, sind nicht verfügbar.

Fügen Sie gelernte Wörter zur Vorhersagebibliothek hinzu

Verwenden Sie den Bildschirm „Wörter hinzufügen“, um Wörter direkt zum Wörterbuch für die Vorhersage mit gelernten Wörtern hinzuzufügen. In diesem Bildschirm wird eine alphabetische Liste aller Wörter angezeigt, die Sie hinzugefügt haben. Diese Liste bietet eine einfache Möglichkeit, Ihr Wörterbuch für die Vorhersage mit gelernten Wörtern zu überprüfen.

1. Wählen Sie Menü > Einstellungen, scrollen Sie zum Abschnitt „Vorhersage“, und wählen Sie Gelernte Wörter. Daraufhin wird der Bildschirm „Gelernte Wörter“ geöffnet.
2. Wählen Sie das Pluszeichen + oben rechts, um ein Wort hinzuzufügen. Der Bildschirm „Wort hinzufügen“ wird geöffnet.
3. Wählen Sie das Feld „Wort hinzufügen“, um einen Cursor einzufügen und die Tastatur zu öffnen. Geben Sie das Wort ein, das Sie hinzufügen möchten.
4. Wählen Sie Sichern. Das Wort wird der Liste der gelernten Wörter hinzugefügt.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2, 3 und 4 für jedes Wort, das Sie hinzufügen möchten.
6. Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Wörtern fertig sind, wählen Sie das Häkchen .

Gelernte Wörter aus dem Wortvorhersage-Lexikon löschen

Sie können einzelne gelernte Wörter oder alle gelernten Wörter aus dem Wortvorhersage-Lexikon löschen.

Wählen Sie Menü > Einstellungen, scrollen Sie zum Abschnitt „Vorhersage“, und wählen Sie Gelernte Wörter. Daraufhin wird der Bildschirm „Gelernte Wörter“ geöffnet.

So löschen Sie einzelne gelernte Wörter:

1. Wählen Sie Bearbeiten. Vor jedem gelernten Wort wird ein rotes Symbol  angezeigt.
2. Wählen Sie das rote Symbol  neben dem Wort, das Sie löschen möchten. Die Taste „Löschen“ wird angezeigt.
3. Wählen Sie Löschen und dann auf , um das Wort aus der Liste zu entfernen.

So löschen Sie alle gelernten Wörter:

Wichtig: Wenn Sie diese Auswahl treffen, werden alle Wörter gelöscht, die Sie zur Vorhersage hinzugefügt haben.

1. Wählen Sie Alles löschen. Die Meldung „Gelernte Wörter löschen“ wird angezeigt.
„Möchten Sie wirklich alle gelernten Wörter löschen?“
2. Wählen Sie OK. Alle Wörter, die Sie zur Vorhersage hinzugefügt haben, werden gelöscht.

Textbausteinenerweiterung

Es können Textbausteine eingegeben werden, die zu einem Wort, einer Wortgruppe oder einem Satz erweitert werden, damit nicht das gesamte Wort, die gesamte Wortgruppe oder der gesamte Satz eingegeben werden muss. Dies kann dem Benutzer Zeit und Mühe ersparen.


1. Wählen Sie Menü und dann Textbausteine bearbeiten.
2. Wählen Sie das Pluszeichen +, um einen Textbaustein hinzuzufügen.
3. Geben Sie in das Feld unter „Textbaustein“ die abgekürzte Form ein.
4. Geben Sie in das Feld unter „Erweitern zu“ das Wort, den Ausdruck oder den Satz jeweils in vollständiger Form ein.
5. Wählen Sie Sichern und .
6. Um den Textbaustein zu testen, öffnen Sie eine Schriftseite und geben Sie die Abkürzung gefolgt von einem Punkt ein. Der Textbaustein sollte erweitert werden.

Fokuswörter

Fokuswörter ist eine Funktion, mit der Sie alle Wörter in der App ausblenden können, mit Ausnahme der Wörter, die Sie zum Erlernen auswählen. Dies ist zwar eine leistungsfähige Lernhilfe, aber es wird empfohlen, dem Gerätebenutzer zunächst ausreichend Zeit zu geben, das System mit ausgeschalteten Fokuswörtern zu erkunden.

Fokuswörter-Fenster

Wählen Sie in der App Menü und dann Fokuswörter aus. Das Fenster „Fokuswörter“ wird geöffnet.

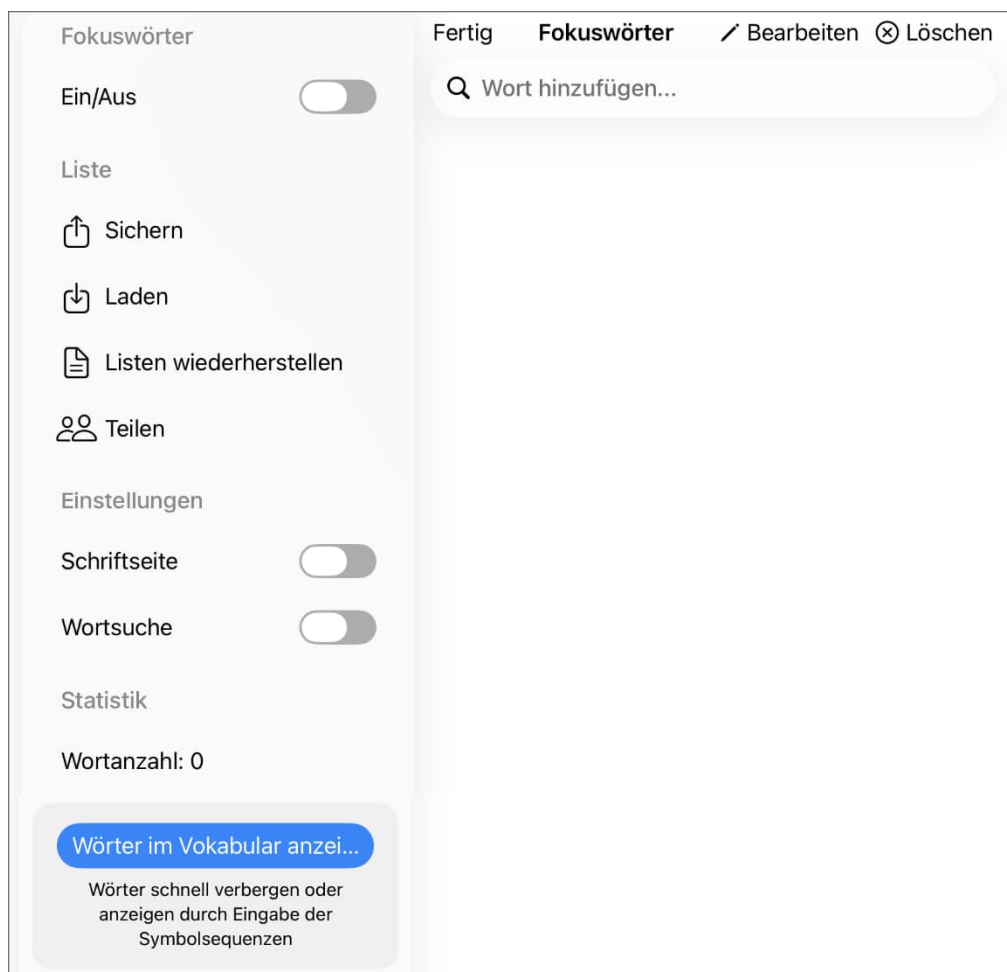

Ein/Aus

Wählen Sie den Ein-/Ausschalter, um Fokuswörter ein- oder auszuschalten. Wenn die Funktion Fokuswörter aktiviert ist, werden nur Tasten für die ausgewählten Wörter angezeigt. Wenn Sie die Einstellung deaktivieren, werden alle verborgenen Wörter wieder angezeigt.

Sichern

Die aktuell angezeigten Wörter werden als Liste gespeichert. Siehe „Eine Liste in einem neuen Verzeichnis speichern“.

Laden

Öffnen Sie eine Standardliste oder eine zuvor gespeicherte benutzerdefinierte Liste.

Listen wiederherstellen

Alle Standardlisten für die App wiederherstellen.

Teilen

Exportiert die aktuelle Liste zu AirDrop, einer E-Mail-App oder einer anderen verfügbaren App. Die Liste wird als Textdatei an die von Ihnen ausgewählte App angehängt.

Schriftseite

Aktiviert oder deaktiviert den Zugriff auf die Schriftseite im Vokabular, wenn Fokuswörter aktiviert sind. Ist die Schriftseite deaktiviert, können Sie nur auf solche Tasten der Schriftseite zugreifen, die als Fokuswörter definiert sind. Wenn die Schriftseite aktiviert ist, können Sie auf die gesamte Schriftseite des Vokabulars zugreifen.

Wortsuche

Aktiviert oder deaktiviert die Wortsuche-Funktion im Vokabular, wenn Fokuswörter aktiviert sind.

Wortanzahl

Eine laufende Gesamtzahl der Wörter in der Liste.

Bearbeiten

Ein Wort aus der aktuellen Liste löschen. Siehe [Ein Wort aus einer Liste löschen](#).

Löschen

Entfernt alle Wörter aus der aktuellen Liste. Wenn Sie „Löschen“ auswählen, erscheint eine Meldung mit der Frage: „Sind Sie sicher, dass Sie alle Einträge löschen wollen?“ Wählen Sie OK, um den Listeninhalt zu löschen.

Wort hinzufügen

Geben Sie ein Wort ein, das der aktuellen Liste hinzugefügt werden soll.

Fertig

Wählen Sie Fertig, wenn Sie alle Wörter zur aktuellen Liste hinzugefügt haben. Im Vokabular werden jetzt nur noch solche Tastenfelder angezeigt, die zu Fokuswörtern führen.

Wörter im Vokabular anzeigen

Mit dieser Funktion können Sie Wörter in einem Vokabular schnell ein- oder ausblenden.




Wenn Sie Wörter im Vokabular anzeigen/verbergen auswählen:

- Die meisten **Tastenfelder** sind ausgeblendet (ausgegraut) – mit Ausnahme derjenigen, die immer sichtbar sind.
- Die aktuell in der Fokuswörter-Liste enthaltenen Tasten sind hervorgehoben.
- Die Tasten der Navigationsleiste der Fokuswörter ändern sich wie folgt:
 - o Alle verbergen blendet alle Tasten im Vokabular aus.
 - o Start kehrt zur Startseite zurück.
 - o Alle anzeigen zeigt alle Tasten im Vokabular an.
 - o Sichern speichert Ihre Änderungen und kehrt zum Menü „Fokuswörter“ zurück.
- Durch Auswahl einer Taste gelangen Sie zur nächsten Seite. Falls die Taste keine Navigation ermöglicht, schaltet ihre Auswahl zwischen dem Pfad und der Taste um.
- Die ausgewählten Tasten werden entweder hervorgehoben oder ausgeblendet.

Neue Wortliste erstellen

Erstellen Sie eine Liste der Wörter, die im Vokabular erscheinen sollen.

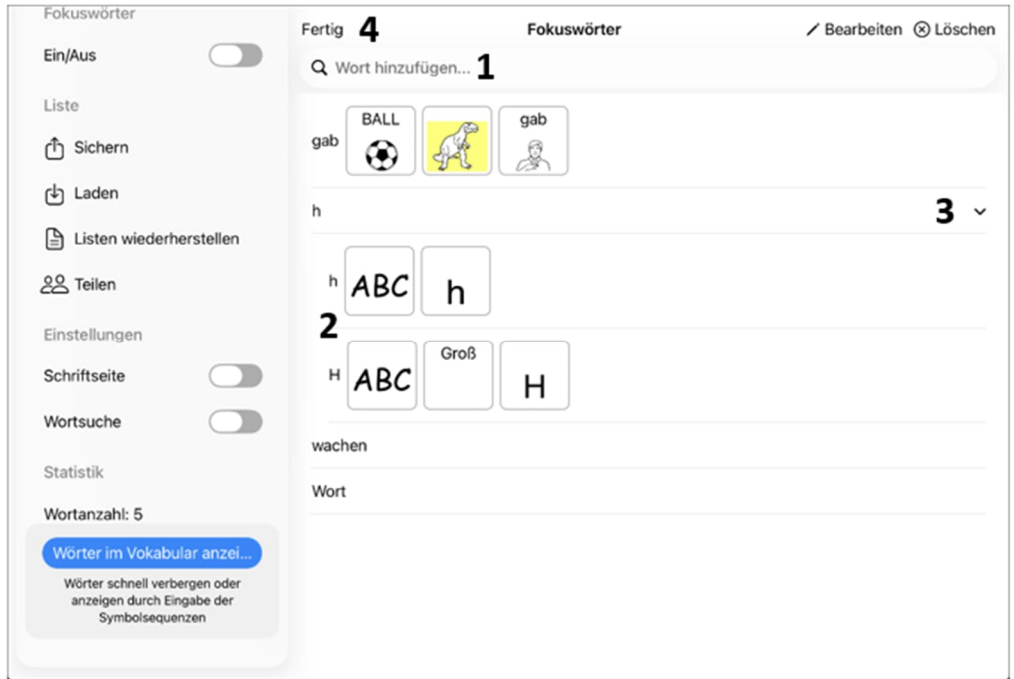

1. Tippen Sie in das Feld „Neues Wort hinzufügen“, um die Tastatur zu öffnen. Während Sie tippen, erscheinen die Zeichen standardmäßig in Kleinbuchstaben. Am oberen Rand der Tastatur werden Wortvorschläge angezeigt. Sie können ein Wort auswählen, um es der Liste hinzuzufügen.

Hinweis: Um die Tastatur auszublenden und so die gesamte Liste anzuzeigen, tippen Sie auf das Symbol zum Ausblenden der Tastatur 

2. Wenn Sie doppelte Zeichen oder Wörter zur Liste hinzufügen, werden diese gruppiert, und rechts neben dem Zeichen oder Wort erscheint ein rechter Pfeil.
3. Um Duplikate anzuzeigen, klicken Sie auf den Pfeil. Der Pfeil zeigt nun nach unten. Wählen Sie den gewünschten Bildpfad aus.
4. Wählen Sie Fertig, wenn Sie das Hinzufügen von Wörtern zur Liste abgeschlossen haben.

Ein Wort aus einer Liste löschen


1. Wählen Sie Bearbeiten. „Bearbeiten“ ändert sich zu „Fertig“. Vor jedem Wort in der Liste erscheint ein rotes -Symbol.
2. Wählen Sie das rote Symbol  neben dem Wort, das Sie löschen möchten. Hinter dem Wort erscheint die Taste „Löschen“.
3. Wählen Sie Löschen, um das Wort aus der Liste zu entfernen
Hinweis: Sie können auch ein Wort nach links wischen, um es zu löschen.
4. Wählen Sie Fertig über den Wörtern, um Löschsymbole auszublenden und in der Bearbeitungsansicht zu bleiben.

Hinweis: Wenn Sie oben rechts auf „Fertig“ klicken, verlassen Sie die Bearbeitungsansicht und es wird das Vokabular mit den von Ihnen ausgewählten Wörtern angezeigt.

Eine Liste speichern

Sie können die als Liste angezeigten Wörter jederzeit speichern.

1. Wählen Sie Sichern, um den iPad®-Bildschirm zum Speichern von Listen zu öffnen. Der Bildschirm öffnet sich im App-Verzeichnis.

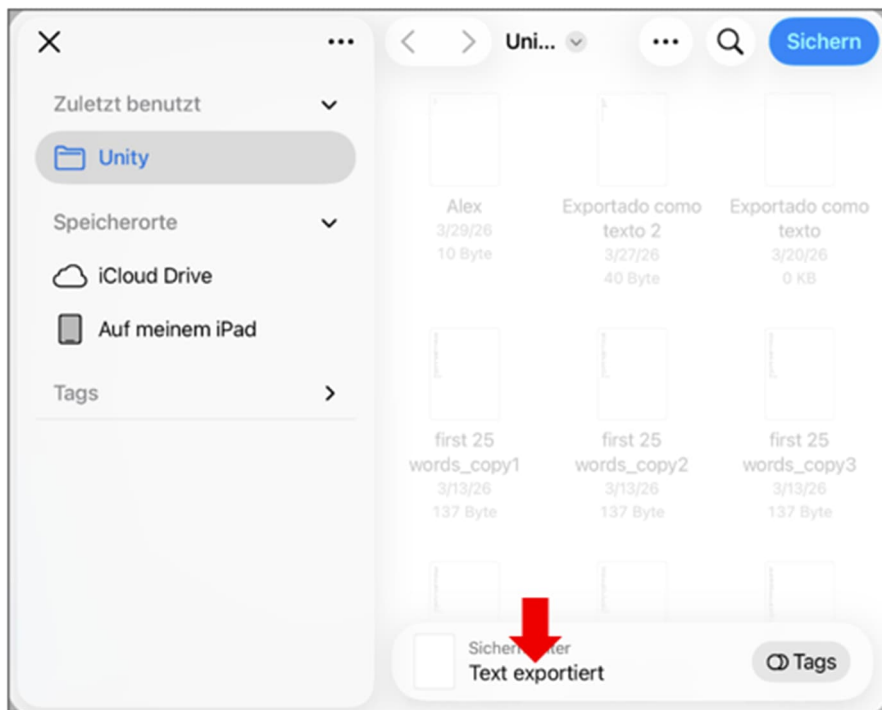


2. Wählen Sie „Text exportiert“.

Hinweis: „Text exportiert“ ist der Standardname für die Textdatei, die aus der Liste exportiert wird.

3. Benennen Sie die exportierte Datei um.
4. Wählen Sie Sichern, um die Textdatei im App-Verzeichnis zu speichern.

Schaltflächengrößen vergrößern

1. Gehen Sie zu Menü > Fokuswörter > Wörter im Vokabular anzeigen.
2. Wählen Sie Button-Boost .
3. Tippen Sie auf eine Schaltfläche, um sie zu vergrößern.

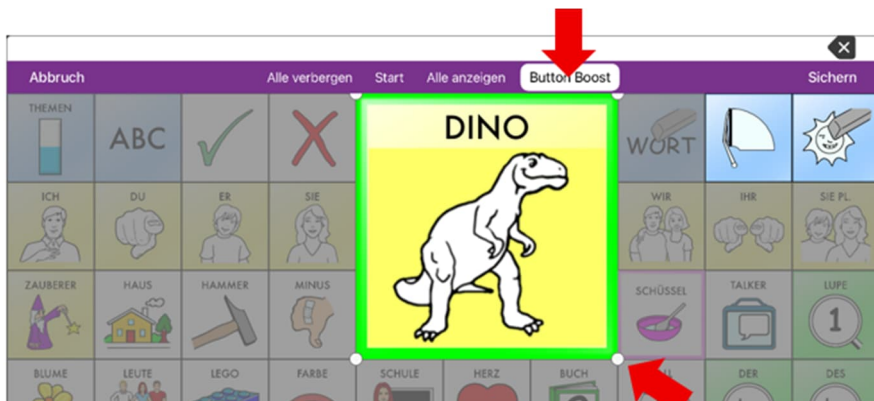

4. Um die vergrößerte Schaltfläche manuell in der Größe anzupassen:
 - a. An einer Ecke ziehenODER
 - b. Tippen Sie auf die Schaltfläche, um eine Abfolge von Vergrößerungsstufen zu durchlaufen: Erster Tipp: 3-fache Normalgröße; zweiter Tipp: 2-fach; dritter Tipp: 1,5-fach; vierter Tipp: zurück zur Normalgröße.
5. Wählen Sie Speichern und anschließend Fertig.

Um die Schaltfläche auf ihre normale Größe zurückzusetzen:

1. Gehen Sie zu Menü > Fokuswörter > Wörter im Vokabular anzeigen.
2. Wählen Sie Button Boost .
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche und durchlaufen Sie dabei eine Abfolge von Verstärkungen, bis sie wieder ihre normale Größe erreicht.
4. Wählen Sie Speichern und anschließend Fertig.

Bearbeiten von Tasten

Zu den Optionen zur Änderung einer Taste gehören die Sprachausgabe der Taste, ihre Farben und Größe, das angezeigte Symbol/Bild, die Tastenfunktion und die Anordnung der Taste. Alle Änderungen der Tasten werden im Editiermodus ausgeführt.

Editiermodus

Sie können nur eine Kopie einer Vokabulardatei bearbeiten, nicht das Original. Informationen zum Kopieren einer Vokabulardatei finden Sie unter [Eine Vokabulardatei kopieren](#).

1. Gehen Sie zu der Seite, die Sie bearbeiten möchten.
2. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten. Die Seite befindet sich jetzt im Editiermodus.
3. Wählen Sie die Taste, die Sie ändern möchten. Daraufhin wird ein Menü geöffnet.
4. Wählen Sie Taste bearbeiten. Es wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie die Taste ändern können.
5. Wählen Sie die gewünschte Menüoption bzw. die gewünschten Optionen aus.
6. Wählen Sie Sichern, um Ihre Änderungen zu speichern.
7. Wählen Sie Fertig, um den Editiermodus zu beenden.

Tastenbeschriftung oder -mitteilung ändern

1. Gehen Sie zu der Seite, die die zu bearbeitende Taste enthält.
2. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
3. Wählen Sie die Taste, die Sie ändern möchten.
4. Wählen Sie Taste bearbeiten.
5. Tippen Sie in den Bereich „Label“ (Beschriftung), um die Beschriftung zu ändern, dies auf der Taste angezeigt wird.
6. Tippen Sie in den Bereich „Mitteilung“, um die gesprochene Mitteilung zu ändern.
7. Wählen Sie Sichern und Fertig.

Hinweis: Wenn der die Funktion Fokuswörter aktiviert ist, während Sie Sichern auswählen, erscheint eine Meldung, die Sie fragt, ob Sie dieses neue Wort ebenfalls Ihrer Fokuswörter-Liste hinzufügen möchten. Wenn Sie Ja auswählen, wird das Wort der Liste hinzugefügt.

Aussprache für eine Tastenmitteilung bearbeiten

1. Gehen Sie zu der Seite, die die zu bearbeitende Taste enthält.
2. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
3. Wählen Sie die Taste und dann Taste bearbeiten. Das Fenster „Taste bearbeiten“ wird geöffnet.
4. Wählen Sie das Feld „Alternative Aussprache“, um die Tastatur zu öffnen.
5. Geben Sie das Wort phonetisch ein (wie es ausgesprochen werden soll).
6. Wählen Sie Anhören, um die Aussprache zu hören.
7. Ändern Sie die Aussprache so oft wie nötig, bis das Wort wie gewünscht ausgesprochen wird.
8. Wählen Sie Sichern.
9. Wählen Sie Fertig, um den Editiermodus zu beenden.

Informationen zum Ändern der Aussprache für einen bestimmten Sprachsynthesizer finden Sie unter [Ausspracheregeln für Wörter](#).

Sonderzeichen einfügen

Manchmal müssen Sie ein Sonderzeichen in ein Wort einfügen, das Sie eingeben, z. B. einen Buchstaben mit Akzent wie ó.

Halten Sie auf der Tastatur die entsprechende Zeichentaste gedrückt. Über der Taste wird ein kleines Menü mit Sonderzeichen geöffnet, die für das betreffende Zeichen verfügbar sind. Wählen Sie das gewünschte Sonderzeichen aus.

Um beispielsweise das Sonderzeichen ó einzufügen, halten Sie die Taste o auf der Tastatur gedrückt und wählen ó aus dem kleinen Menü.

Tastenbild ändern

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Bild auf einer Taste zu ändern: nach Symbolen suchen, ein Bild aus einer Bibliothek auswählen, ein vorhandenes Foto importieren, mit der Kamera ein neues Foto machen oder ein KI-generiertes Bild auswählen (siehe [KI zur Erzeugung von Bildern für Tasten verwenden](#)).

Nach Symbolen suchen

Hinweis: Bei der Suche nach Symbolen basiert die Suche auf der aktuellen Vokabularsprache, nicht auf der Gerätesprache. Wenn Sie beispielsweise ein spanisches Vokabular verwenden, muss das Gerät nicht auf Spanisch eingestellt sein, um korrekte Suchergebnisse zu erhalten.

1. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
2. Wählen Sie die Taste und dann Taste bearbeiten.
3. Wählen Sie Bild auswählen, um eine Liste der Bildbibliotheken zu öffnen.
4. Wählen Sie das Suchsymbol  oben rechts.
5. Geben Sie den Namen oder die Beschreibung eines Bildes ein.
6. Wählen Sie Suchen. Bildnamen werden mit Vorschaubildern gezeigt.
7. Wählen Sie das gewünschte Bild aus.
8. Wählen Sie Sichern.
9. Wählen Sie Fertig, um den Editiermodus zu beenden.

Ein Bild aus einer Bibliothek auswählen

1. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
2. Wählen Sie die Taste und dann Taste bearbeiten.
3. Wählen Sie Bild auswählen, um eine Liste mit Bildbibliotheken zu öffnen.
4. Wählen Sie eine Bildbibliothek.
5. Bildnamen werden mit Vorschaubildern gezeigt.

Hinweis: Einige Bibliotheken zeigen eine Liste mit Bildkategorien an.

6. Scrollen Sie durch die Bilder, und wählen Sie das gewünschte Bild aus.

7. Wählen Sie Sichern.
8. Wählen Sie Fertig, um den Editiermodus zu beenden.

Ein vorhandenes Foto importieren

Diese Option ermöglicht den Zugriff auf Bilder, die bereits aufgenommen und auf dem Gerät gespeichert wurden.

1. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
2. Wählen Sie die Taste und dann Taste bearbeiten.
3. Wählen Sie Foto importieren. Daraufhin werden Fotos angezeigt, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind.

Hinweis: Oben in diesem Fenster können Sie Alben auswählen, um Fotosammlungen anzuzeigen, oder das Suchfeld verwenden, um Fotos nach Namen zu suchen.

4. Wählen Sie das gewünschte Foto.
5. Geben Sie einen Namen für das Bild ein, und wählen Sie .
6. Wählen Sie Sichern.
7. Wählen Sie Fertig, um den Editiermodus zu beenden.

Ein Foto mit der Kamera aufnehmen

1. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
2. Wählen Sie die Taste und dann Taste bearbeiten.
3. Wählen Sie Kamera benutzen.
4. Wählen Sie die Kamera-Taste.
5. Wählen Sie Foto verwenden, und geben Sie einen Namen für das Bild ein.
6. Wählen Sie  und Sichern.
7. Wählen Sie Fertig, um den Editiermodus zu beenden.

Statische Symbole für ein einheitliches Erscheinungsbild verwenden

Ein statisches Symbol auf einer Taste ändert sich in einem Vokabular nicht von einer Sequenzebene zur nächsten. Um die Komplexität des Erlernens zusätzlicher Symbole zu reduzieren, empfiehlt es sich, statische Symbole zu verwenden. So verwenden Sie statische Symbole:

1. Wählen Sie Menü > Vokabular-Einstellungen, und scrollen Sie zum Abschnitt „Tasten“.
2. Statische Symbole EINSCHALTEN.

Tastenvorgaben ändern

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Darstellung von Tasten in einem Vokabular zu ändern.

Tastengröße ändern

1. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
2. Wählen Sie die Taste, deren Größe Sie ändern möchten, und dann Tastengröße ändern.
3. Wählen Sie die gewünschte Anzahl an Zeilen und Spalten aus.
4. Wählen Sie Sichern. Wählen Sie Fertig, um den Editiermodus zu beenden.

Eine Tastenlayout ändern

1. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
2. Wählen Sie die Taste, die Sie ändern möchten, und dann Taste bearbeiten.
3. Scrollen Sie nach unten zu dem Bereich, den Sie bearbeiten möchten.
4. Schriftart, Schriftgröße, Textfarbe, Hintergrundfarbe, Rahmenfarbe, und/oder Rahmenbreite können nach Bedarf geändert werden.
5. Wählen Sie Sichern und Fertig.

Die Grundfarben einer Taste ändern


Die Grundfarben sind die Farboptionen, die auf der Registerkarte „Standard“ des Menüs „Farbe wählen“ angezeigt werden.

1. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
2. Wählen Sie die Taste, die Sie ändern möchten, und dann Taste bearbeiten.
3. Scrollen Sie nach unten zu den Farbeinstellungen, und wählen Sie Schriftfarbe, Hintergrundfarbe oder Rahmenfarbe.
4. Das Fenster „Farbe wählen“ öffnet sich mit der Registerkarte „Standard“.
5. Wählen Sie die gewünschte Farbe aus und wählen Sie Sichern.

Die Farben auf einer Taste anpassen

1. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
2. Wählen Sie die Taste, die Sie ändern möchten, und dann Taste bearbeiten.
3. Scrollen Sie zu den Farbeinstellungen, und wählen Sie Schriftfarbe, Hintergrundfarbe oder Rahmenfarbe.
4. Das Fenster „Farbe wählen“ wird mit der Registerkarte „Standard“ geöffnet.
5. Wählen Sie die Registerkarte Eigene aus. Wählen Sie anschließend Gitter, Spektrum oder Regler, um eine der verfügbaren Funktionen zur Farbauswahl zu nutzen. Nachdem Sie eine Farbe ausgewählt und angewendet haben, wählen Sie Sichern und anschließend Fertig.

Wählen Sie eine Farbe aus der Registerkarte Gitter oder Spektrum aus

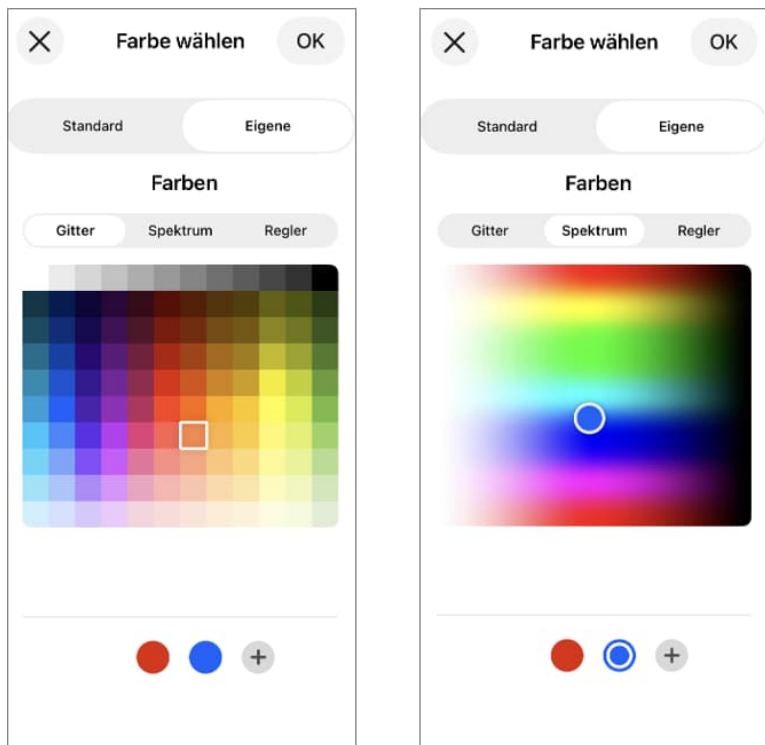

Tippen Sie in den Farbverlauf. Der Cursor springt an die getippte Stelle, und das Vorschaufeld zeigt die aktuelle Farbe an. Tippen Sie bei Bedarf auf verschiedene Bereiche, bis die gewünschte Farbe angezeigt wird.

Tipp: Sie können auch einen Finger verwenden, um den Cursor auf Bereiche des Farbverlaufs zu ziehen.

Wenn Sie die Farbe, die im Vorschaufeld angezeigt wird, für eine spätere Verwendung speichern möchten, tippen Sie auf das Symbol . Es erscheint ein neuer Farbkreis. Sie können diese Farbe jederzeit auswählen und anwenden.



Sobald das Vorschaufeld die gewünschte Farbe anzeigt, wählen Sie oben rechts OK. Die Farbe wird auf den ausgewählten Bereich der Schaltfläche angewendet.

Wählen Sie eine Farbe aus der Registerkarte Regler

×

Farbe wählen

OK

Standard

Eigene

Farben

Gitter

Spektrum

Regler

ROT

171

GRÜN

225

BLAU

162

sRGB Hex-Farbe

#

ABE1A2

+

Wenn Sie den RGB-Code (Rot-Grün-Blau) für die gewünschte Farbe kennen:

Schieben Sie den Cursor mit dem Finger entlang jedes Farbbalkens, bis die Zahlen auf der rechten Seite die gewünschten Werte erreichen. Das Vorschaufeld zeigt die aktuelle Farbe an.

Wenn Sie den Hex-Code für die gewünschte Farbe kennen:


Tippen Sie auf den Hex-Code am unteren Rand des Vorschaufelds. Sobald die Tastatur erscheint, löschen Sie den Hex-Code und geben Sie den gewünschten Code ein. Das Vorschaufeld zeigt nun die Farbe an. Schließen Sie die Tastatur.

sRGB Hex-Farbe # ABE1A2

Tastenrandgröße erhöhen

Sie können den Abstand zwischen den Tasten vergrößern, indem Sie die Tastenrandgröße in den Einstellungen erhöhen.

1. Wählen Sie Menü > Einstellungen, und scrollen Sie zum Abschnitt „Tasten“.
2. Wählen Sie Tastenrandgröße.
3. Wählen Sie eine Randgröße aus. Die Standardgröße lautet „Keine“. Um den Rand zu vergrößern, wählen Sie eine Option zwischen 1 Punkt und 100 Punkt aus.
4. Wenn Sie eine Auswahl treffen, ändern sich die Abstände der Tasten.

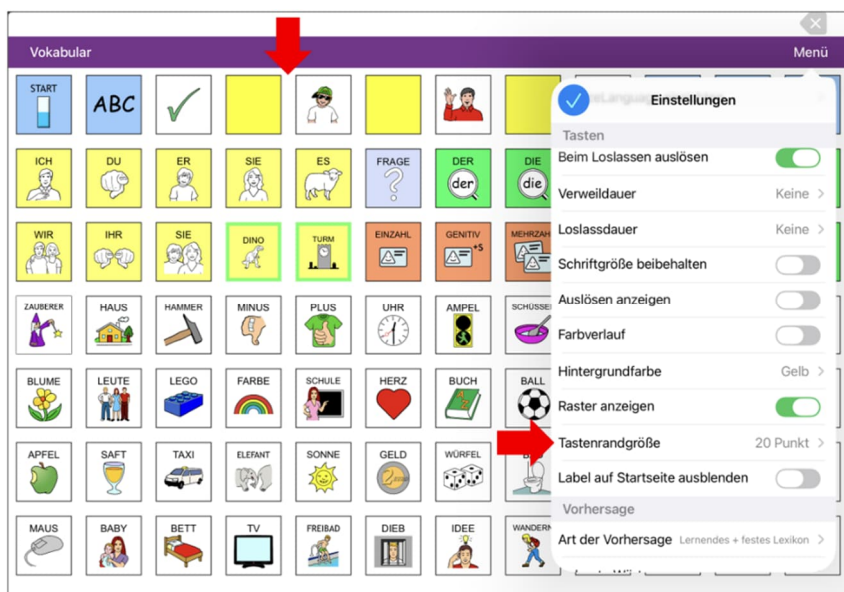

5. Wenn Sie zu viel oder zu wenig Abstand ausgewählt haben, treffen Sie eine andere Auswahl.
6. Wenn Sie mit der Größe des Abstandes zufrieden sind, wählen Sie .

Tasten-Einstellungen ändern

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie die Tastenbelegung ändern und die Navigationspfeile der Tasten ein- und ausblenden.

Zeiteinstellungen für Tasten

Um motorischen Einschränkungen gerecht zu werden, können Tasten so eingestellt werden, dass sie beim Berühren oder Loslassen aktiviert werden. Außerdem kann die Verweildauer und die Loslassdauer eingestellt werden. Wählen Sie Menü > Einstellungen, und scrollen Sie zum Abschnitt „Tasten“.

Beim Loslassen auslösen

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden die Tasten beim Loslassen und nicht beim Berühren aktiviert. Auf diese Weise kann der Gerätebenutzer den Finger über den Bildschirm gleiten lassen, bevor er auf der gewünschten Taste loslässt. Wählen Sie den Schalter Beim Loslassen auslösen. zum EIN- und AUSSCHALTEN der Einstellung.

Verweildauer

Die Einstellung für die Verweildauer steuert die Verzögerung, bevor ein Tastendruck erkannt wird. Wenn der Benutzer eine Taste berührt, wird die ausgewählte Taste durch ein leichtes Dimmen und ein weißes quadratisches Kästchen gekennzeichnet. Solange der Benutzer den Finger weiterhin im Tastenbereich hält, wird die Verweildauer heruntergezählt. Wenn das Zeitlimit erreicht ist, wird der Tastendruck akzeptiert. Um eine Verweildauer einzustellen, wählen Sie Verweildauer, und wählen Sie einen Wert zwischen 0,1 Sekunden und 5,0 Sekunden aus.

Loslassdauer

Die Loslassdauer gilt für die Tasten und für das Textfenster.

Tasten: Die Loslassdauer soll dazu beitragen, versehentliches doppeltes Drücken zu vermeiden. Wenn die Zeit eingestellt ist, sind alle Tasten für den angegebenen Zeitraum deaktiviert, nachdem eine Taste aktiviert wurde.

Textfenster: Die Loslassdauer soll verhindern, dass Wörter versehentlich zweimal im Textfenster angezeigt werden. Wenn die Zeit eingestellt ist, wird das Textfenster für den angegebenen Zeitraum deaktiviert, nachdem der Benutzer auf das Textfenster tippt, um die angezeigten Wörter zu sprechen. Die Einstellung „Loslassdauer“ hat keinen Einfluss auf das Textfenster-Löschtaste (X).

Um eine Loslassdauer festzulegen, wählen Sie Loslassdauer und dann einen Wert zwischen 0,1 Sekunden und 5,0 Sekunden.

Startseiten-Labels ein-/ausblenden

1. Wählen Sie Menü > Einstellungen, und scrollen Sie zum Abschnitt „Tasten“.
2. Schalten Sie die Label auf Startseite ausblenden EIN/AUS.

Tastenfunktion

Mit Tastenfunktionen können Sie eine Taste zum Ausführen einer Funktion verwenden.

Verfügbare Tastenfunktionen

1 Auswahl von Seite

Führt vorübergehend zu einer vordefinierten Seite für eine einzelne Auswahl und kehrt dann automatisch zur vorherigen Seite zurück

- In diesem Modus werden die Seiten und ihre Ladereihenfolge aufgezeichnet. Der Modus wird durch die Aktivierung eines anderen Tastentyps beendet, und Sie kehren zur anfänglichen Seite zurück.
- Diese Funktion fügt die Seite immer in den Seitenverlauf ein und verwendet den Anzeigezähler (siehe [Technische Hinweise](#)).
- Sobald eine Taste ausgewählt wird, die nicht zur Navigation dient oder zur vorherigen Seite führt, und der Anzeigezähler größer als Null ist, werden Sie einen Schritt (d.h. eine Seite) zurückgeführt.
- Wenn dieser Modus aktiv ist, ignoriert „Seite anzeigen“ den Seitenverlauf. Beispielsweise können Sie von der Startseite aus Seite A anzeigen lassen, dann mittels „1 Auswahl von Seite“ zu Seite B wechseln und anschließend eine Taste auswählen, die nicht zur Navigation gehört. Sie werden zur Startseite zurückgeleitet.

Alle Seiten schließen

Entfernt alle durch „1 Auswahl von Seite“ durchlaufenen Seiten. Sie bleiben auf der aktuellen Seite. Wenn sich „Alle Seiten schließen“ und „Seite anzeigen“ auf

derselben Taste befinden, wird der Anzeigezähler zurückgesetzt (siehe [Technische Hinweise](#)).

Alles sprechen

Spricht die Schaltflächennachricht aus und zeigt sie im Textfenster an.

App/Anwendung öffnen

Öffnet eine bestimmte iPad®-App über eine Taste des Vokabulars. Diese Option ist auf dedizierten Geräten nicht verfügbar.

Audiodatei abspielen beenden

Beendet die Wiedergabe von Audio- und Videodateien aus der Bibliothek des Benutzers. Diese Option ist auf dedizierten Geräten nicht verfügbar.

Audiodatei wiedergeben

Spielt eine Audiodatei aus der Mediathek des Benutzers ab. Diese Option ist auf dedizierten Geräten nicht verfügbar.

Auf Seite bleiben für 1 Auswahl

Wenn Sie eine Taste auf einer Seite haben, die für eine Auswahl geöffnet wurde, und Sie möchten nicht zur vorherigen Seite zurückkehren, verwenden Sie die Aktion „Auf Seite bleiben für 1 Auswahl“, um für eine weitere Auswahl auf der Seite zu bleiben.

Batteriestatus

Zeigt den aktuellen Batteriestatus im Textfenster an.

Cursor bewegen

Bewegt den Cursor im Textfenster nach links, rechts, oben oder unten. Wenn Sie links oder rechts wählen, wird der Cursor durch Drücken der Taste um ein Zeichen, ein Wort oder einen Satz innerhalb einer Zeile im Textfenster nach links oder rechts bewegt. Wenn Sie nach oben oder nach unten wählen, wird der Cursor durch Drücken der Taste im Textfenster um eine Zeile nach oben oder unten bewegt.

Cursor platzieren

Fügt den Cursor in das Textfenster ein. Das Textfenster und die Taste wechseln ebenfalls die Farbe zu Cyan (blaugrün), um den Modus „Cursor platzieren“ anzuzeigen. Wenn Sie zusätzlichen Text eingeben, beendet das Textfenster den Modus „Cursor platzieren“. Um den Modus „Cursor platzieren“ zu beenden, ohne zusätzlich Text einzugeben, wählen Sie einfach die Taste.

- Wenn der Cursor am Ende des Textfensters eingefügt wird, bleibt er ausgeblendet, wenn „Sichtbarer Cursor“ unter Einstellungen > Textfenster deaktiviert ist.
- Wenn „Cursor platzieren erlauben“ unter Einstellungen > Textfenster aktiviert ist, wird „Cursor platzieren“ als Option im Textfenster-Kontextmenü angezeigt, sodass Sie das Textfenster gedrückt halten können, um den Cursor zu platzieren, ohne die Taste „Cursor platzieren“ einzurichten.

Cursor-Modus

Ändert den Bewegungsmodus des Cursors: Durchlauf, Zeichen, Wort oder Satz.

Wenn Sie Durchlauf wählen, können Sie durch Drücken der Taste zwischen den Modi Zeichen, Wort und Satz wechseln. Jedes Mal, wenn Sie die Taste wählen, ändert sich die Tastenbeschriftung je nach dem aktuellen Modus (selbst wenn Sie eine eigene Tastenbeschriftung erstellt haben).

Wenn Sie Zeichen auswählen, wird der Cursor durch Drücken der Taste um ein Zeichen nach links oder rechts bewegt. Wenn Sie Wort auswählen, wird der Cursor durch Drücken der Taste um ein Wort nach links oder rechts bewegt. Wenn Sie Satz auswählen, wird der Cursor durch Drücken der Taste um einen Satz nach links oder rechts bewegt.

Display löschen

Löscht den Text aus dem Textfenster.

Foto machen

Aktiviert die Gerätekamera, sodass Sie Bilder aufnehmen können, die auf einer Taste angezeigt und zusammen mit anderen Bildern auf dem Gerät gespeichert werden.

Hilfesignal

Löst ein lautes, Aufmerksamkeit erregendes Geräusch aus.

Internetadresse öffnen

Hiermit gelangen Sie direkt zu der Website, die mit der Taste verknüpft ist. Wenn Sie „Internetadresse öffnen“ auswählen, werden Sie aufgefordert, die URL der Website einzugeben. Wenn die eingeschränkte Ansicht aktiviert ist, kann der Benutzer nicht über die erste Seite der Website hinausgehen.

KI: Textfenster ändern

Zeigt zwei KI-Optionen an:

KI-Nachrichtенbearbeitung, um Grammatik, Satzzeichen oder Rechtschreibung des Textes im Textfenster zu bearbeiten.

KI-Übersetzung nutzt KI, um den Textfenster-Text in die von Ihnen gewählte Sprache zu übersetzen.

Kopfsteuerung zentrieren

Zentriert den Cursor in Bezug auf die aktuelle Kopfposition des Benutzers.

Label sprechen

Spricht die Tastenbeschriftung, zeigt sie aber nicht im Textfenster an.

Lauter

Erhöht die Lautstärke.

Leiser

Verringert die Lautstärke.

Letzte Ausgabe wiederholen

Wiederholt die zuletzt gesprochene Mitteilung.

Letzten Satz sprechen

Spricht nur den letzten Satz im Textfenster.

Letztes Wort sprechen

Spricht nur das letzte Wort im Textfenster.

Lösche Zeichen

Löscht das letzte Zeichen im Textfenster.

Mitteilung anzeigen

Zeigt die Mitteilung der Taste im Textfenster, die Mitteilung wird aber nicht gesprochen.

Mitteilung ausgeben

Spricht die Mitteilung der Taste und zeigt sie im Textfenster an.

Mitteilung sprechen

Spricht die Mitteilung der Taste, zeigt sie aber nicht im Textfenster an.

Profil wählen

Ändert die Einstellungen auf die eines gespeicherten Profils.

Rechner

Öffnet ein Popup-Fenster mit einem funktionierenden Rechner.

Scanning stoppen

Stoppt einen laufenden Scan.

Seite anzeigen

Führt Sie zu einer vordefinierten Seite, die dauerhaft angezeigt wird.

Seite zurück

Führt Sie nacheinander zu den vorherigen Seiten in der Seitenwarteschlange zurück (siehe [Technische Hinweise](#)).

SMS – Seite Unterhaltungen anzeigen

Ermöglicht das Hinzufügen einer SMS-Taste zu einem benutzerdefinierten Vokabular. Verwenden Sie die Taste, um Ihre SMS-App zu öffnen.

Sound aufnehmen

Erstellt eine Sprachaufnahme.

Sound wiedergeben

Spielt Sprachaufnahmen ab.

Sprachdatenaufzeichnung ein/aus

Schaltet die Sprachdatenaufzeichnung ein und aus. Mit der Sprachdatenaufzeichnung kann das Gerät Daten zur Sprachverwendung sammeln, die Sie zur webbasierten Analyse auf die Realize Language-Website hochladen können.

Sprache anhalten/fortsetzen

Unterbricht die im Gange befindliche Sprachwiedergabe, z. B. eine Sprachmitteilung oder Sprachaufnahme. Durch erneutes Aktivieren dieser Aktion wird die angehaltene Wiedergabe fortgesetzt.

Sprache ein/aus

Wenn das Gerät gerade eine lange Mitteilung spricht, wird durch Auswahl dieser Taste die Wiedergabe nicht gestoppt, sondern nur stummgeschaltet. Durch erneutes Auswählen derselben Taste wird der Text wieder hörbar.

Springe zu Seite

Mit „Springe zu Seite“ gelangen Sie zu einer neuen Seite für eine einzige kurze Auswahl und wieder zurück; mittels „1 Auswahl von Seite“ geöffnete Seiten werden vergessen.

- Funktionen wie „Springe zu Seite“ funktionieren ähnlich wie „Seite anzeigen“, wenn der Anzeigezähler größer als Null ist.
- Die Funktion „Springe zu Seite“ funktioniert wie „Seite anzeigen“, wenn der Anzeigezähler Null ist.

Bei Auswahl der ersten Taste haben „Springe zu Seite“ und „1 Auswahl von Seite“ dieselbe Wirkung.

Bei der zweiten Tastenbetätigung verhält sich „Springe zu Seite“ wie „Seite anzeigen“.

Startseite anzeigen

Mit „Startseite anzeigen“ gelangen Sie zur Startseite der Vokabulardatei. Es löscht den Seitenverlauf und den Anzeigezähler.

Statisches Symbol überschreiben

Überschreibt die im Menü > Vokabular-Einstellungen > Statische Symbole gemachte Einstellung. So können Sie einzelnen Tasten in Symbolsequenzen abweichende Symbole geben.

Stopp

Stoppt die aktuell wiedergegebene Sprachdatei.

Systemtastatur

Öffnet die iPad-Tastatur.

Textfenster – Text einfügen

Fügt den Text aus der Zwischenablage des Systems in das Textfenster ein. Dadurch kann Text aus anderen Apps in die App eingefügt werden. Diese Option ist auf dedizierten Geräten nicht verfügbar.

Textfenster – Text kopieren

Kopiert den Text aus dem Textfenster in die Zwischenablage des Systems. Der kopierte Text kann dann in andere Apps eingefügt werden. Diese Option ist auf dedizierten Geräten nicht verfügbar.

Textfenster – Text teilen

Teilt den Text im Textfenster per E-Mail, SMS, über die sozialen Netzwerkdienste Facebook und Twitter oder den Blogging-Dienst Tumblr. Diese Option ist auf dedizierten Geräten nicht verfügbar.

Textfenster speichern

Speichert den aktuell im Textfenster angezeigten Text unter der ausgewählten Taste.

Tracking pausieren/fortsetzen

Hält die Kopfsteuerung an oder setzt sie fort. Erstellen Sie eine Taste „Pausieren/Fortfahren“, wenn Sie einen größeren Bereich als die kleineren Optionen „Pause“ und „Fortsetzen“ in der Navigationsleiste verwenden möchten. Wenn die Verfolgung angehalten wird, färbt sich die Taste rot.

Videodatei wiedergeben

Gibt eine Videodatei oder eine YouTube-Videodatei wieder. Die Datei muss auf dem Gerät gespeichert werden. Fügen Sie die Aktion „Videodatei wiedergeben“ einer Taste hinzu und wählen Sie die Taste, wann immer Sie das Video abspielen möchten.

Vokabular öffnen

Richten Sie eine Taste ein, um eine benutzerdefinierte Vokabulardatei zu öffnen.

Whiteboard

Verwandelt eine Taste in eine frei formatierbare Zeichenfläche. Wählen Sie die Stiftfarbe und -breite, radieren oder machen Sie Aktionen während des Zeichnens rückgängig und laden Sie Zeichnungen und speichern Sie diese unter einem Namen.

Wort abwandeln

Ändert das bestehende Wort in die gewählte grammatikalische Form.

Wort löschen

Löscht das letzte Wort aus dem Textfenster.

Wortsuche

Findet den Pfad zu einem Wort, nach dem Sie suchen. Durch diese Aktion wird ein Wortsuche-Fenster geöffnet. Geben Sie ein Wort ein, und wählen Sie Suchen. Es wird mindestens ein Pfad zum Wort angezeigt. Wählen Sie einen Pfad aus, und folgen Sie ihm bis zum Wort.

Wortvorhersage

Legt die Vorhersagereihenfolge für Tasten für die Wortvorhersage auf einer Tastaturseite fest. Wählen Sie Wortvorhersage, um die Liste „Reihenfolge“ zu öffnen. Die ausgewählte Zahl bestimmt, wie wahrscheinlich es ist, dass das aktuell im Textfenster angezeigte Wort auf der Taste angezeigt wird. Die Optionen reichen von „Number 1“ (Nummer 1) (am wahrscheinlichsten) bis „Number 10“ (Nummer 10) (am wenigsten wahrscheinlich).

Zeichenvorhersage

Legt die Vorhersagereihenfolge für Tasten für die Zeichenvorhersage auf einer Tastaturseite fest. Wählen Sie Zeichenvorhersage, um die Liste „Reihenfolge“ zu öffnen. Die ausgewählte Zahl bestimmt, wie wahrscheinlich es ist, dass das aktuell im Textfenster angezeigte Zeichen auf der Taste angezeigt wird. Die Optionen reichen von „Number 1“ (Nummer 1) (am wahrscheinlichsten) bis „Number 10“ (Nummer 10) (am wenigsten wahrscheinlich).

Zeit und/oder Datum ausgeben

Zeigt das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit im Textfenster an.

Technische Hinweise:

Hinter den Kulissen der App

- wird der Seitenverlauf erstellt, während Sie Vokabularseiten öffnen, die zu Ihrer aktuellen Position führen.
- zählt der Anzeigezähler, wie oft Sie eine Seite nur für 1 Auswahl öffnen, ohne eine andere Navigationsaktion auszuwählen. Der Zähler beeinflusst die Funktionsweise der Tasten „Springe zu Seite“ und anderer Tasten.

Tastenaktion hinzufügen oder ändern

So fügen Sie eine Tastenaktion hinzu:

1. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
2. Wählen Sie die Taste, die Sie ändern möchten, und dann Taste bearbeiten.
3. Scrollen Sie zum Abschnitt „Tastaturfunktion“, und wählen Sie Hinzufügen.
4. Scrollen Sie durch die Liste der Aktionen, und wählen Sie die gewünschte Aktion. Sie wird unter der vorhandenen Aktion für die Taste hinzugefügt.
5. Wählen Sie Sichern und Fertig.

So ändern Sie eine Tastenaktion:

1. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
2. Wählen Sie die Taste, die Sie ändern möchten, und dann Taste bearbeiten.
3. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Tastenfunktion“.
4. Wählen Sie die vorhandene Aktion. Die Liste der verfügbaren Aktionen wird angezeigt, und die vorhandene Aktion ist ausgewählt.
5. Wählen Sie die gewünschte neue Aktion. Die neue Aktion ersetzt die alte Aktion unter „Tastenfunktion“.
6. Wählen Sie Sichern und Fertig.

Tastenfunktionen neu anordnen oder entfernen

1. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
2. Wählen Sie die Taste, die Sie ändern möchten, und dann Taste bearbeiten.
3. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Tastenfunktion“.
4. Wählen Sie Bearbeiten. Vor jeder Aktion, die mit der Taste verknüpft ist, wird ein rotes Symbol  angezeigt.
5. Um eine Aktion zu entfernen, wählen Sie das rote Symbol  und dann Löschen. Um die Reihenfolge der Aktionen neu anzuordnen, halten Sie die grauen Balken  rechts neben einer Aktion gedrückt, und ziehen Sie die Aktion an die richtige Position.
6. Wählen Sie Fertig.
7. Wählen Sie Sichern und Fertig.

Taste zum Speichern des Textfensterinhalts erstellen

1. Gehen Sie zu der Seite mit der Taste, auf der Sie Text speichern möchten.
2. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
3. Wählen Sie die Taste, auf der Sie Text speichern möchten.
4. Wählen Sie Taste bearbeiten.
5. Benennen Sie die Taste. Sie können optional auch eine Mitteilung erstellen und das Format ändern.
6. Scrollen Sie zum Abschnitt „Tastenfunktion“, und wählen Sie Hinzufügen.
7. Scrollen Sie durch die Liste der Aktionen, und wählen Sie Textfenster speichern.
8. Wählen Sie Sichern. Wählen Sie Fertig, um den Editiermodus zu beenden.

Hinweis: Nachdem ein Satz oder eine Phrase erstellt wurde, kann diese(r) auf einer Taste gespeichert werden. Hierzu navigieren Sie zu der Position der Taste „Text speichern“, die Sie erstellt haben. Wählen Sie die Taste, wählen Sie Weiter, wählen Sie die Taste, auf der Sie den Text speichern möchten, und wählen Sie dann OK. Der Text wird auf der ausgewählten Taste angezeigt, und jedes Mal, wenn Sie diese Taste wählen, wird der gespeicherte Text gesprochen.

Eine Taste zum Aufnehmen eines Fotos erstellen

Diese Funktion bietet eine Alternative, sodass Sie nicht im Editiermodus sein müssen, um einer Taste ein Bild hinzuzufügen. Sie können eine Taste erstellen, mit der Sie bei jedem Antippen der Taste ein Foto aufnehmen können, das automatisch in die Taste importiert wird. Das Bild wird auch Ihrer Bibliothek importierter Bilder hinzugefügt.

So richten Sie die Tastenaktion ein:

1. Wechseln Sie zu der Seite, auf der sich die gewünschte Tastenposition befindet.
2. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
3. Wählen Sie die Taste, die Sie verwenden möchten.
4. Wählen Sie Taste bearbeiten.
5. Fügen Sie eine Beschriftung und eine Mitteilung hinzu.
6. Scrollen Sie nach unten zu den Tastenfunktionen, und wählen Sie Hinzufügen, um eine Liste mit Funktionen zu öffnen.
7. Wählen Sie Foto machen.
8. Die Funktion „Foto machen“ wird den Funktionen der Taste hinzugefügt.
9. Wählen Sie Sichern. Wählen Sie Fertig, um den Editiermodus zu beenden.

So machen Sie ein Foto für Ihre Taste:

1. Wählen Sie die neue Taste, um die Kamera zu aktivieren.
2. Wählen Sie die Kamera-Taste.
3. Wählen Sie Foto verwenden.
4. Das Foto wird als Bild auf der Taste angezeigt.

Hinweis: Bei jedem Drücken der Taste wird das vorhandene Bild auf der Taste durch ein neues Bild von der Kamera ersetzt. Wenn das alte Bild auf der Taste importiert wurde und nicht anderweitig verwendet wird, wird es gelöscht. Auf der Taste erscheint ein Bild, bis Sie die Taste erneut drücken.

So löschen Sie Fotos:

Um Fotos zu löschen, müssen Sie Ihr Gerät mit Ihrem Computer verbinden und die Fotos anschließend mit dem Explorer vom Computer entfernen.

Eine Taste zur Wiedergabe eines Videos erstellen

1. Öffnen Sie in Unity AAC die Seite, auf der die Taste zum Abspielen eines Videos gespeichert werden soll.
2. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
3. Wählen Sie die Taste, die Sie verwenden möchten, und dann Taste bearbeiten.
4. Geben Sie der Taste eine Beschriftung und scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Tastenfunktionen.
5. Wählen Sie die vorhandene Funktion aus, um die Liste „Funktion auswählen“ zu öffnen.
6. Wählen Sie Funktion Videodatei wiedergeben. Im Fenster „Art des Videos“ werden zwei Optionen angezeigt: „Video aus Bibliothek“ und „Video von YouTube“.
7. Wählen Sie Video aus Bibliothek. Es öffnet sich eine Liste der verfügbaren Videos; oberhalb der Liste ist Videos ausgewählt.
 - Wenn das Video ursprünglich auf Ihrem Gerät aufgenommen wurde, lassen Sie Videos ausgewählt.
 - Wenn das Video ursprünglich über die Cloud importiert wurde, wählen Sie Alben aus.
8. Scrollen oder durchsuchen Sie die Liste.
9. Wählen Sie das gewünschte Video aus. Das Video wird im Fenster „Video auswählen“ angezeigt.
10. Wählen Sie Verwenden. Nachdem die Videokomprimierung abgeschlossen ist, wird unter Tastenfunktion die Option „Videodatei wiedergeben“ angezeigt.
11. Wählen Sie Sichern. Die von Ihnen eingegebene Beschriftung wird auf der Taste angezeigt.
12. Wählen Sie Fertig. Wenn Sie die Taste auswählen, wird das Video wiedergegeben.

Eine Taste zum Abspielen eines YouTube™-Videos erstellen

Hinweis: Sie benötigen eine aktive WLAN-Verbindung.

1. Wählen Sie auf Ihrem Gerät das gewünschte YouTube-Video aus.
2. Wählen Sie das Symbol Teilen  und dann das Symbol Link kopieren . Es sollte die Meldung „Kopiert“ erscheinen.
3. Öffnen Sie die Seite, die die Taste enthält, mit der das YouTube-Video abgespielt werden soll.
4. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
5. Wählen Sie die Taste, die Sie verwenden möchten, und dann Taste bearbeiten.
6. Geben Sie der Taste eine Beschriftung und scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Tastenfunktionen.
7. Wählen Sie die vorhandene Funktion aus, um die Liste „Funktion auswählen“ zu öffnen.
8. Wählen Sie Funktion Videodatei wiedergeben. Im Fenster „Art des Videos“ werden zwei Optionen angezeigt: „Video aus Bibliothek“ und „Video von YouTube“.
9. Wählen Sie Video von YouTube. Im YouTube-Fenster wird ein Feld für den Videolink angezeigt.
10. Halten Sie das Videolink-Feld gedrückt. Es erscheint eine kleine Aufforderung zum Einfügen.
11. Wählen Sie Einfügen. Der kopierte Link wird in das Feld eingefügt.
12. Wählen Sie Fertig. Unter „Tastenfunktion“ wird die Option „Videodatei wiedergeben“ angezeigt.
13. Wählen Sie Sichern. Die von Ihnen eingegebene Beschriftung wird auf der Taste angezeigt.
14. Wählen Sie Fertig. Wenn Sie die Taste auswählen, sollte das YouTube-Video abgespielt werden.

Hinweis: Wenn Sie beim Abspielen des YouTube-Videos keine WLAN-Verbindung haben, bleibt der Bildschirm schwarz und die folgende Meldung wird angezeigt:

„Keine Verbindung zu YouTube.

Zum Abspielen eines YouTube-Videos ist eine Internetverbindung erforderlich.“

Wenn eine Internetverbindung besteht, YouTube aber nicht erreichbar ist, erscheint folgende Meldung:

„Keine Verbindung zu YouTube.

YouTube scheint von Ihrem Internetanbieter gesperrt zu sein. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.“


Eine Taste zum Öffnen einer App erstellen

Hinweis: Diese Funktion ist bei dedizierten Systemen nicht verfügbar.

1. Gehen Sie zu der Seite mit der Taste, die Sie verwenden möchten.
2. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
3. Halten Sie die Taste gedrückt, die Sie ändern möchten.
4. Wählen Sie Taste bearbeiten.
5. Geben Sie der Taste eine Beschriftung und scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Tastenfunktionen.
6. Wählen Sie Hinzufügen. Daraufhin wird eine Liste der verfügbaren Funktionen geöffnet.
7. Wählen Sie die Funktion App/Anwendung öffnen Die Liste „Kategorie auswählen“ wird geöffnet.
8. Scrollen Sie durch die Liste, und suchen Sie nach der gewünschten Kategorie.

So suchen Sie nach der App:

1. Wählen Sie das Suchsymbol 🔍 auf der rechten Seite der Titelleiste „Kategorie auswählen“ oder ziehen Sie es in der Liste nach unten. Eine Tastatur wird geöffnet.
2. Geben Sie einen Kategorienamen oder einen Teil des Namens ein. Daraufhin wird eine Liste der entsprechenden Namen geöffnet.

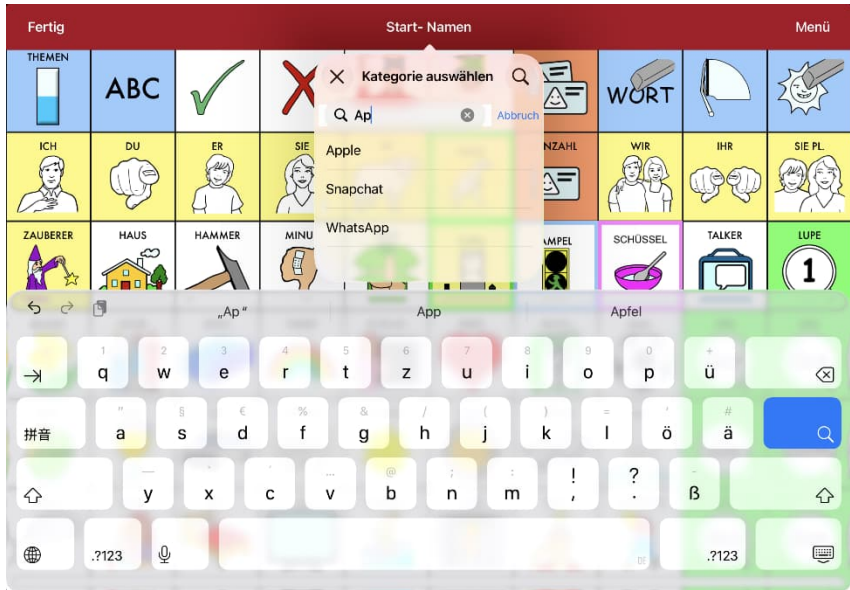

Hinweis: Die Suchfunktion sucht nach Übereinstimmungen an beliebiger Stelle im Namen.

3. Wählen Sie die gewünschte Kategorie und App aus und wählen Sie Sichern.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die gewählte App auf Ihrem Gerät installiert ist.

4. Beenden Sie den Editiermodus und wählen Sie die Taste aus. Nun sollte die App geöffnet werden.

Hinweis: Falls für die App eine Anmeldung erforderlich ist, stellen Sie sicher, dass Sie die Anmeldeinformationen zur Hand haben.

5. Um die App zu beenden und zum Gerät zurückzukehren, wählen Sie „Unity“ oben links im Bildschirm.

◀ Unity 1:47 PM Sun Apr 27

Eine Rechnertaste erstellen

1. Wählen Sie auf der Tastatur oder auf der Nummernseite Menü und Seite bearbeiten.
2. Wählen Sie eine leere Taste und dann Taste bearbeiten.
3. Geben Sie unter Label die gewünschte Beschriftung ein, löschen Sie die Mitteilung und wählen Sie das gewünschte Symbol aus.
4. Scrollen Sie nach unten zu „Tastenfunktion“, und wählen Sie und löschen Sie Sprachmitteilung als Tastenaktion aus.
5. Wählen Sie Hinzufügen und dann Rechner.
6. Wählen Sie Sichern.

Eine Lautstärkeregler-Taste erstellen

 Eine übermäßige Lautstärke oder ein zu hoher Schalldruck über längere Zeit bei der Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern kann Gehörschäden verursachen.

Sie können Tasten in Ihrem Vokabular mit der Funktion Lautstärkeregler belegen.

1. Gehen Sie zu der Seite, auf der Sie die Taste erstellen möchten.
2. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
3. Halten Sie die Taste gedrückt, die Sie verwenden möchten. Daraufhin wird eine Liste mit Tastenoptionen angezeigt.
4. Wählen Sie Taste bearbeiten.
5. Fügen Sie eine Tastenbeschriftung und ein Symbol hinzu.
6. Wählen Sie unter „Tastenfunktion“ die Option Hinzufügen. Daraufhin wird eine Liste der Aktionen angezeigt.
7. Wählen Sie entweder Lauter oder Leiser.
8. Wählen Sie Sichern. Wählen Sie Fertig, um den Editiermodus zu beenden.

Eine Batteriestand-Taste erstellen

Sie können eine Taste erstellen, die den Batteriestatus des Geräts und des Verstärkers im Textfenster anzeigt.

1. Gehen Sie zu der Seite, auf der Sie die Taste erstellen möchten.
2. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
3. Halten Sie die Taste gedrückt, die Sie verwenden möchten. Daraufhin wird eine Liste mit Tastenoptionen angezeigt.
4. Wählen Sie Taste bearbeiten.
5. Fügen Sie eine Tastenbeschriftung und ein Symbol hinzu.
6. Wählen Sie unter „Tastenfunktion“ die Option Hinzufügen. Daraufhin wird eine Liste der Aktionen angezeigt.
7. Wählen Sie Batteriestatus.
8. Wählen Sie Sichern. Wählen Sie Fertig, um den Editiermodus zu beenden.

Eine Datums-/Zeittaste erstellen

Sie können eine Taste erstellen, die das Datum, die Uhrzeit oder beides im Textfenster zeigt.

1. Gehen Sie zu der Seite, auf der Sie die Taste erstellen möchten.
2. Wählen Sie in Unity AAC Menü und Seite bearbeiten.
3. Halten Sie die Taste gedrückt, die Sie verwenden möchten. Daraufhin wird eine Liste mit Tastenoptionen angezeigt.
4. Wählen Sie Taste bearbeiten.
5. Fügen Sie eine Tastenbeschriftung und ein Symbol hinzu.
6. Wählen Sie unter „Tastenfunktion“ die Option Hinzufügen. Daraufhin wird eine Liste der Aktionen angezeigt.
7. Wählen Sie Zeit und/oder Datum ausgeben.
8. Wählen Sie eine der Optionen: Zeit und Datum, Datum oder Zeit.
9. Wählen Sie Sichern. Wählen Sie Fertig, um den Editiermodus zu beenden.

Eine Taste zum Öffnen einer benutzerdefinierten Vokabulardatei erstellen

1. Gehen Sie zu der Seite mit der Taste, die Sie verwenden möchten.
2. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
3. Wählen Sie Taste bearbeiten.
4. Fügen Sie eine Tastenbeschriftung und ein Symbol hinzu.
5. Wählen Sie unter „Tastenfunktion“ die Option Hinzufügen.
6. Wählen Sie Vokabular öffnen.
7. Wählen Sie die benutzerdefinierte Vokabulardatei aus, die mit der Taste geöffnet werden soll.
8. Wählen Sie Sichern. Wählen Sie Fertig.

Tipp: Mit diesem Verfahren könnten Sie ein zweisprachiges Vokabular erstellen. Beispiel: Richten Sie in einem spanischen Vokabular die Aktion „Vokabular öffnen“ ein, um zu einem englischen Vokabular zu wechseln. Richten Sie dann an derselben Position im englischen Vokabular eine Taste ein, um zum spanischen Vokabular zu wechseln. Auf diese Weise können Sie schnell zwischen den Sprachen hin und her wechseln.

Eine Taste zur Verknüpfung mit einer neuen Seite erstellen

1. Gehen Sie zu der Seite mit der Taste, mit der die Verknüpfung erstellt werden soll.
2. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
3. Wählen Sie die Taste, die mit der neuen Seite verknüpft werden soll.
4. Wenn die Taste leer ist, wählen Sie Neue Taste erstellen. Andernfalls wählen Sie Taste bearbeiten.
5. Geben Sie die Beschriftung und die Mitteilung (optional) ein.

6. Scrollen Sie zum Abschnitt „Tastenfunktion“, wählen Sie Hinzufügen, und wählen sie eine Navigationsfunktion für die Taste von der Dropdown-Liste.
 - Die Optionen „Seite anzeigen“ und „1 Auswahl von Seite“ enthalten eine Liste der Seiten, mit denen eine Verknüpfung hergestellt werden kann.
 - Weitere Aktionen sind: „Springe zu Seite“, „Seite zurück“, „Startseite anzeigen“, „Auf Seite bleiben für 1 Auswahl“ und „Alle Seiten schließen“.
 - Eine Beschreibung der Funktionsweisen dieser Tasten finden Sie unter [Verfügbare Tastenfunktionen](#).

Hinweis: Wenn dieser Taste bereits eine Aktion zugewiesen ist, wählen Sie Bearbeiten, dann das rote Symbol , danach Löschen und zuletzt Fertig.

Hinweis: Wenn Sie „Seite zurück“ oder „Startseite anzeigen“ wählen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

7. Wählen Sie die Seite, zu der Sie navigieren möchten, aus der Liste. Wenn die Seite noch nicht vorhanden ist, wählen Sie +, um eine neue Seite zu erstellen, mit der die Schaltfläche verknüpft werden soll. Wählen Sie Keine Animation.
8. Wählen Sie Sichern. Wählen Sie Fertig, um den Editiermodus zu beenden.

Tasten verschieben und ausblenden

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Tasten verschoben oder ausgeblendet werden.

Eine Taste verschieben

1. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
2. Wählen Sie die zu verschiebende Taste, und ziehen Sie sie an eine andere Position.

Hinweis: Wenn Sie mit dem Ziehen der Taste beginnen, wird die ursprüngliche Position rot umrandet. Wenn Sie an die neue Position wechseln, wird die rote Umrandung an diese Position verschoben.



3. Nach dem Loslassen bewegt sich die Taste an die neue Position. Wenn an der neuen Position bereits eine Taste vorhanden ist, wird sie an die ursprüngliche Position verschoben. Die Tasten tauschen die Positionen.

Eine Taste ausblenden

Manchmal ist die gleichzeitige Anzeige aller Tasten unübersichtlich, oder es soll eine Taste ausgeblendet werden, um zu verhindern, dass sie ausgewählt werden kann.

1. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
2. Wählen Sie die Taste, die Sie ausblenden möchten, und wählen Sie Taste bearbeiten.
3. Schalten Sie Sichtbar AUS.
4. Wählen Sie Sichern. Wählen Sie Fertig, um den Editiermodus zu beenden.

Eine Taste kopieren und einfügen

Sie können Tasten kopieren und an neuen Positionen einfügen.

Hinweis: Wenn Sie die Kopie einer Taste ändern, bearbeiten Sie nur die Kopie.

1. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
2. Wählen Sie die zu kopierende Taste. Das Menü „Taste bearbeiten“ wird geöffnet.
3. Wählen Sie Taste kopieren.
4. Wählen Sie Fertig.
5. Gehen Sie zu der Seite, auf der Sie die kopierte Taste hinzufügen möchten.
6. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
7. Wählen Sie die Stelle, an der Sie die kopierte Taste platzieren möchten. Das Menü „Taste bearbeiten“ wird geöffnet und enthält zusätzliche Optionen.
8. Wählen Sie Taste einfügen. Die kopierte Taste wird an dieser Stelle angezeigt.
9. Wählen Sie Fertig.

Kopieren und dieselbe Taste verwenden

Sie können die gleiche Taste kopieren und auf einer anderen Seite duplizieren. Sie können diese Methode für Tasten verwenden, die Werkzeuge enthalten, die auf jeder Seite verwendet werden.

Hinweis: Jede Kopie der Taste wird automatisch angepasst, wenn eine der duplizierten Tasten bearbeitet wird.

1. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
2. Wählen Sie die zu kopierende Taste. Das Menü „Taste bearbeiten“ wird geöffnet.
3. Wählen Sie Taste kopieren.
4. Wählen Sie Fertig.
5. Gehen Sie zu der Seite, auf der Sie die kopierte Taste hinzufügen möchten.
6. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
7. Wählen Sie die Stelle, an der Sie die kopierte Taste platzieren möchten. Das Menü „Taste bearbeiten“ wird geöffnet und enthält zusätzliche Optionen.
8. Wählen Sie Dieselbe Taste verwenden. Die kopierte Taste wird an dieser Stelle angezeigt.
9. Wählen Sie Fertig.

Eine Tastenvorgabe kopieren/einfügen

„Tastenvorgaben“ bezieht sich auf die Hintergrundfarbe, die Schriftgröße und die Optionen, die mit einer Taste verbunden sind. Manchmal ist es schneller und einfacher, den Stil einer Taste aus einer vorhandenen Taste zu kopieren und einzufügen, anstatt jedes dieser Elemente bei einer neuen Taste zu bearbeiten.

1. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
2. Wählen Sie die Taste, deren Format Sie kopieren möchten. Das Menü „Taste bearbeiten“ wird geöffnet.
3. Wählen Sie Taste kopieren.
4. Wählen Sie die Taste, auf die das Format angewendet werden soll. Das Menü „Taste bearbeiten“ wird geöffnet und enthält zusätzliche Optionen.
5. Wählen Sie Tastengröße ändern. Die Taste zeigt den eingefügten Stil an.
6. Wählen Sie Fertig.

Seiten

Eine Seite bearbeiten

1. Gehen Sie zu der Seite, die Sie bearbeiten möchten.
2. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
3. Wählen Sie Menü und dann Seitenlayout bearbeiten. Das Fenster „Seite bearbeiten“ wird geöffnet.
4. Sie können Folgendes tun:
 - Seite umbenennen
 - Die Anzahl der Zeilen und Spalten ändern
 - Die Art der Seite oder die Hintergrundfarbe ändern
 - Ein Bild hinzufügen, ändern oder entfernen
5. Wählen Sie Sichern.

Eine Seite duplizieren

1. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
2. Wählen Sie Menü und dann Seite importieren/kopieren.
3. Wählen Sie Seite duplizieren. Im Fenster „Name der neuen Seite“ wird der aktuelle Name und „(1)“ angezeigt.
4. Wählen Sie den Namen, und geben Sie über die Tastatur einen geeigneten Namen für die kopierte Seite ein.
5. Wählen Sie Sichern. Die duplizierte Seite wird mit dem neuen Namen angezeigt.
6. Bearbeiten Sie die Seite nach Bedarf.
7. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig, um den Editiermodus zu beenden.

Eine weitere Seite bearbeiten

1. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
2. Wählen Sie Menü und dann Weitere Seite bearbeiten. Daraufhin wird eine Liste der verfügbaren Seiten geöffnet.
3. Scrollen Sie durch die Liste, und wählen Sie die gewünschte Seite aus.
4. Wählen Sie Fertig. Diese Seite steht Ihnen nun zur Verfügung, um Tasten zu kopieren oder Ihr Vokabular zu ergänzen oder zu ändern.

Eine neue leere Seite erstellen

1. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
2. Wählen Sie Menü und dann Neue Seite.
3. Wählen Sie Neue leere Seite.
4. Wählen Sie das Feld „Name der Seite“, und geben Sie über die Tastatur einen Namen für die Seite ein.
5. Legen Sie die gewünschte Anzahl an Zeilen und Spalten fest.

Hinweis: Standardmäßig wird die Anzahl der Zeilen und Spalten der aktuell angezeigten Seite verwendet. Wählen Sie gegebenenfalls andere Werte.

6. Wählen Sie das Menü Hintergrundfarbe aus und wählen Sie eine Farbe.
7. Wählen Sie ein Bild aus (*optional*).
8. Wählen Sie Sichern. Daraufhin wird eine neue Seite mit leeren Tasten angezeigt.
9. Beginnen Sie auf dieser Seite mit dem Erstellen von Tasten.
10. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig.

Eine Seite als Schriftseite festlegen

1. Gehen Sie zu Seite bearbeiten > Menü > Seitenlayout bearbeiten.
2. Scrollen Sie im Fenster „Seite bearbeiten“ zu „Art der Seite“ und wählen Sie Schriftseite aus.

Dadurch wird die aktuelle Seite als Schriftseite festgelegt.

Eine neue Seite anhand einer Navigationsaktion erstellen

1. Gehen Sie zu der Seite, auf der die Navigation starten soll.
2. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
3. Wählen Sie die Position der Taste aus, die zu der neuen Seite führen soll.
4. Wählen Sie Taste bearbeiten. Das Dialogfeld „Taste bearbeiten“ wird geöffnet.
5. Geben Sie eine Tastenbeschriftung ein, und wählen oder importieren Sie ein Bild.
6. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Tastenfunktion“ und wählen Sie die vorhandene Funktion aus, um die Liste der verfügbaren Funktionen zu öffnen.
7. Wählen Sie die Funktion Seite anzeigen, um die Liste der vorhandenen Seiten zu öffnen.
8. Wählen Sie das Pluszeichen + oben rechts, um eine neue Seite hinzuzufügen.
9. Wählen Sie Neue leere Seite oder Neue Seite von Vorlage.
10. Geben Sie einen Namen für die Seite ein. Wenn Sie „Neue leere Seite“ ausgewählt haben, passen Sie die Anzahl der Zeilen und Spalten an.
11. Wählen Sie Sichern und dann Keine Animation und dann erneut Sichern.
12. Wählen Sie Fertig.

Eine Seite aus einer anderen Vokabulardatei kopieren

Manchmal können Sie durch die Verwendung zuvor erstellter Seiten Zeit sparen. In der App können Sie mehrere Seiten gleichzeitig importieren.

1. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
2. Wählen Sie Menü und dann Seite importieren/kopieren.
3. Wählen Sie Seite importieren.
4. Wählen Sie die Vokabulardatei mit der gewünschten Seite und dann die zu importierenden Seiten. Neben jeder ausgewählten Seite wird ein Häkchen angezeigt.
5. Wählen Sie Importieren, und wählen Sie .
6. Wählen Sie noch im Editiermodus die Taste, über die Sie zu den importierten Seiten navigieren möchten.
7. Wählen Sie Taste bearbeiten.
8. Geben Sie der Taste eine Beschriftung und gegebenenfalls ein Symbol, und nehmen Sie die gewünschten Formatänderungen vor.
9. Scrollen Sie nach unten zu „Tastenfunktion“, wählen Sie Hinzufügen und dann Seite anzeigen.
10. Wählen Sie die importierte Seite.
11. Wählen Sie eine Animation oder Keine Animation aus.
12. Wählen Sie Sichern. Wählen Sie Fertig, um den Editiermodus zu beenden.

Einer Seite eine Geste hinzufügen

1. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
2. Wählen Sie Menü und dann Gesten bearbeiten.
3. Wählen Sie das Pluszeichen + oben rechts, um eine Geste hinzuzufügen. Das Fenster „Gesten bearbeiten“ wird geöffnet.
4. Fügen Sie eine Beschriftung und eine Mitteilung hinzu.
5. Um Gesten auf einmal zu einer gesamten Vokabulardatei hinzuzufügen, wählen Sie Auf allen Seiten verwenden.

6. Wählen Sie das Feld Art der Geste und dann die gewünschte Gesteart aus. Neben der von Ihnen ausgewählten Art erscheint ein Häkchen.
7. Wählen Sie Hinzufügen, und wählen Sie die dann die gewünschte Geste-funktion aus.

Hinweis: Um eine Geste-funktion zu löschen, wählen Sie Geste bearbeiten. Wischen Sie auf der zu löschenden Geste nach links. Wählen Sie die Taste Löschen, um die Funktion zu löschen.
8. Wählen Sie Sichern. Wählen Sie Fertig, um den Editiermodus zu beenden.

Hintergrundfarbe überschreiben

Verwenden Sie dieses Verfahren, um die Hintergrundfarbe aller Seiten in einem Vokabular zu ändern. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie den Abstand um die Tasten herum vergrößern, sodass mehr Hintergrund zu sehen ist. Informationen zum Anpassen der Tastenrandgröße finden Sie unter Tastenvorgaben ändern.

1. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
2. Wählen Sie Menü und dann Vokabularvorgaben. Im Fenster Vokabularvorgaben werden Optionen zum Ersetzen der Farbe angezeigt.
3. Wählen Sie das Feld Hintergrundfarbe aus, um eine Liste mit Farben zu öffnen.
4. Wählen Sie eine Farbe aus. Die Farbe wird im Feld „Hintergrundfarbe“ angezeigt.
5. Um die Standardhintergrundfarbe außer Kraft zu setzen, aktivieren Sie die Option Seitenhintergrundfarbe.
6. Wählen Sie Sichern. Wählen Sie Fertig, um den Editiermodus zu beenden.

Tipp: Sie können nach Bedarf zwischen den Standardhintergrundfarben der Seite und der Überschreibungsfarbe hin- und herschalten, indem Sie Seitenhintergrundfarbe EIN- und AUSSCHALTEN.

Eine Verbseite hinzufügen

Fügen Sie schnell eine Seite mit den verschiedenen grammatikalischen Formen eines Verbs hinzu.

1. Gehen Sie zu der Vokabularseite, auf der Sie die Taste hinzufügen möchten.
2. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
3. Wählen Sie die Taste, die Sie verwenden möchten. Ein Menü wird geöffnet.



4. Wählen Sie Verbseite hinzufügen. Das Fenster „Verbseite hinzufügen“ wird geöffnet.
5. Geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur eine beliebige Form des Worts ein.

6. Wählen Sie die Taste Alle Formen hinzufügen. Das Verb mit seinen Endungen wird angezeigt.

21 von 21 gefundenen Wörtern

Grundform	kommen
Verb 1.P. Sing.	komme
Verb 2.P. Sing.	kommst
Verb 3.P. Sing.	kommt
Verb 1./3.P. Pl.	kommen
Verb 2.P. Pl.	kommt
Verb 1.P. Sing. (Vght)	kam

- Falls eine Verbform fehlt oder falsch ist, können Sie die richtige Form manuell eingeben.
 - Wählen Sie Suchen, um ein Bild für das Verb und seine Formen zu finden.
 - Wählen Sie Foto, um ein bereits vorhandenes Foto zu finden, das als Bild verwendet werden soll.
 - Wählen Sie Kamera, um ein Foto aufzunehmen, das als Bild verwendet werden soll.
 - Wählen Sie Bild generieren, um mithilfe von KI ein Bild zu erstellen. Die Einstellung „KI-Funktionen aktivieren“ muss eingeschaltet sein. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „KI zur Bildgenerierung für Schaltflächen verwenden“.
 - Wenn Sie das Bild ersetzen müssen, wählen Sie Löschen, um es zu löschen.
7. Wählen Sie Sichern. Eine Taste wird erstellt, die dem Stil der aktuellen Seite entspricht.
8. Wählen Sie Fertig, um den Editiermodus zu beenden. Die von Ihnen erstellte Verbseite wird angezeigt.

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Seite, indem Sie Wörter manuell hinzufügen

Sie können in einem Vokabular eine benutzerdefinierte Seite erstellen, indem Sie einzelne Wörter oder Phrasen zu einer Liste hinzufügen. Informationen zur Erstellung einer benutzerdefinierten Seite mithilfe von KI finden Sie unter „Eine benutzerdefinierte Seite mit KI erstellen“.

1. Wählen Sie Menü und Seite bearbeiten.
2. Wählen Sie Menü und Neue Seite. Ein Menü öffnet sich.
3. Wählen Sie Erstellung benutzerdefinierter Seiten.
4. Tippen Sie auf „Fügen Sie Ihr(e) eigenes/, eigenen Wort(s) hinzu“ um eine Tastatur zu öffnen.
5. Geben Sie ein Wort ein.



6. Wählen Sie das Symbol „Hinzufügen“  aus.
7. Fügen Sie weiterhin Wörter hinzu.

8. Um die eingegebenen Wörter jederzeit anzuzeigen, wählen Sie das Symbol  zum Ausblenden der Tastatur, um die Tastatur auszublenden.


Bearbeiten - Um ein einzelnes Wort, mehrere Wörter oder alle Wörter zu löschen, wählen Sie **Bearbeiten**. Setzen Sie anschließend Häkchen vor die Wörter, die Sie löschen möchten, und wählen Sie **Auswahl löschen**. Um die gesamte Wortliste zu löschen, wählen Sie **Alles löschen** und bestätigen Sie mit **OK**.

Sequenz anzeigen - Um die Tastensequenz für ein Wort anzuzeigen, wählen Sie **Sequenz anzeigen**. „Sequenz anzeigen“ ändert sich in „Sequenz ausblenden“, sodass Sie die Tastensequenz wieder verbergen können, sobald Sie dazu bereit sind.

 - Um das Wort zur aktuellen Liste hinzuzufügen, wählen Sie das Symbol „Hinzufügen“.

Sichern - Um die Wortliste mit Ihren Änderungen zu speichern, wählen Sie **Sichern**.

9. Um ein Bild für das Wort auszuwählen, markieren Sie das Wort. Das Fenster „Bild auswählen“ wird geöffnet.

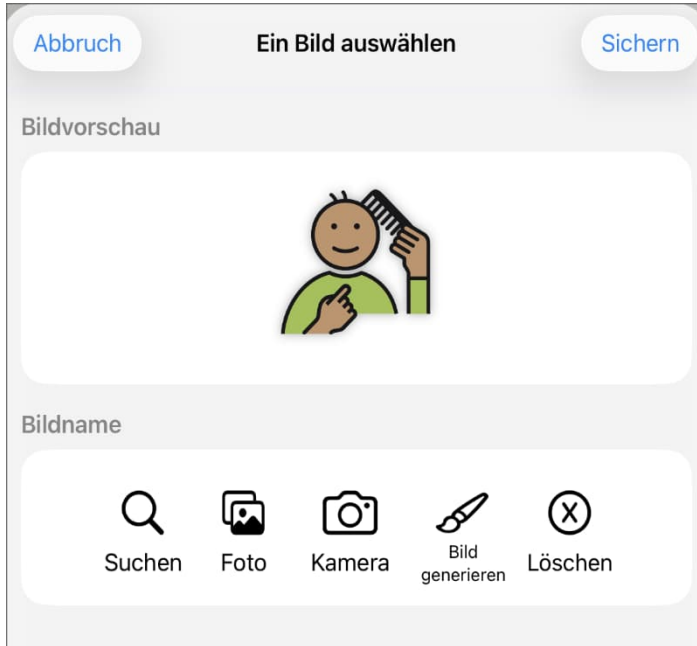

10. Wählen Sie ein Bild aus, indem Sie ein Werkzeug im unteren Bereich des Fensters auswählen. Das erzeugte Bild erscheint unter der „Bildvorschau“.

Suchen - Um ein vorhandenes Bild zu finden, wählen Sie eine Bildbibliothek und eine Bildkategorie aus und wählen Sie ein Bild.

Foto - Um ein vorhandenes Foto auszuwählen, wählen Sie Foto und anschließend ein Foto aus.

Kamera - Um ein Foto aufzunehmen, wählen Sie Kamera, um die Kamera Ihres Geräts zu aktivieren.

Bild generieren - Um ein Bild mithilfe von KI zu generieren, wählen Sie Bild generieren. Die Einstellung KI-Funktionen aktivieren muss eingeschaltet sein. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Nutzen Sie KI, um Bilder für Schaltflächen zu generieren“.

Löschen - Um das neue Bild zu löschen und es erneut zu versuchen, wählen Sie Löschen.

11. Um das Bild zu speichern, wählen Sie oben rechts Sichern.

Spezialseite erstellen

Sie können einzelne Seiten in Ihrem Vokabular als spezielle Seite definieren, z. B. als Startseite oder Vorlagenseite.

Startseite ändern

1. Gehen Sie zu der Seite, die Sie als Startseite verwenden möchten.
2. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten. Die Seite befindet sich jetzt im Editiermodus.
3. Wählen Sie Menü. Das Menü „Seite bearbeiten“ wird geöffnet.
4. Wählen Sie Seitenlayout bearbeiten. Das Fenster „Seite bearbeiten“ wird geöffnet.
5. Wählen Sie Art der Seite. Das Menü „Art der Seite“ wird geöffnet.
6. Wählen Sie Startseite.
7. Wählen Sie Fertig, um die Änderung fertigzustellen, und wählen Sie Fertig, um den Editiermodus zu beenden.

Die Seite als Vorlage speichern

Sie können eine bestehende Vokabularseite als Vorlage verwenden, um schnell neue Seiten erstellen zu können.

1. Gehen Sie zu der Seite, die Sie als Startseite verwenden möchten.
2. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten. Die Seite befindet sich jetzt im Editiermodus.
3. Wählen Sie Menü. Das Menü „Seite bearbeiten“ wird geöffnet.
4. Wählen Sie Seitenlayout bearbeiten. Das Fenster „Seite bearbeiten“ wird geöffnet.
5. Wählen Sie den aktuellen Seitentyp aus. Das Menü „Art der Seite“ wird geöffnet.
6. Wählen Sie Vorlage.
7. Wählen Sie Fertig. und wählen Sie dann Sichern.

8. Die neue Vorlagenseite wird mit dem von Ihnen vergebenen Namen angezeigt.
9. Fügen Sie je nach Bedarf Tasten und Formatierungen zur Seite hinzu.
10. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig, um den Editiermodus zu beenden.

Eine neue Seite anhand einer Vorlage hinzufügen

1. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten. Die Seite befindet sich jetzt im Editiermodus.
2. Wählen Sie Menü und dann Neue Seite.
3. Wählen Sie Neue Seite von Vorlage. Das Fenster „Neue Seite“ wird geöffnet.
4. Wählen Sie das Feld „Name der Seite“, um eine Tastatur zu öffnen, geben Sie einen Namen für die neue Seite ein und wählen Sie Sichern.

Hinweis: Nachdem Sie „Sichern“ ausgewählt haben, wird die Taste „Sichern“ deaktiviert, sodass Sie sie nicht versehentlich ein zweites Mal auswählen können. Die Meldung „Lade“ wird so lange angezeigt, bis die neue Seite vollständig geladen ist.

5. Die neue Seite wird mit den Tasten und der Formatierung aus der Vorlage angezeigt und zeigt den von Ihnen eingegebenen Namen an.
6. Bearbeiten Sie die neue Seite nach Bedarf.
7. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig, um den Editiermodus zu beenden.

Die Startseite kann nicht gelöscht werden.

Die Startseite ist der Ausgangspunkt für alle Wörter in Ihrem Vokabular. Aus diesem Grund können Sie die Startseite nicht löschen. Wenn Sie versuchen, sie zu löschen, werden Sie in einer Meldung aufgefordert, eine andere Seite als Startseite festzulegen.

Beispiel 1: Versuchen Sie, die Startseite im Menü „Seite bearbeiten“ zu löschen

Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten. Wählen Sie dann Menü und dann Seite löschen. In einer Meldung wird darauf hingewiesen, dass Sie die Startseite nicht löschen können, und Sie werden aufgefordert, eine andere Seite als Startseite festzulegen.

Wählen Sie OK, um die Mitteilung zu schließen. Legen Sie dann eine andere Seite als Startseite fest. Siehe [Startseite ändern](#). Wenn Sie diese Seite noch immer löschen möchten, können Sie dies jetzt tun.

Beispiel 2: Versuchen Sie, die Startseite im Fenster „Art der Seite“ zu löschen

Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten. Wählen Sie dann Menü und dann Seitenlayout bearbeiten. Im Fenster „Seite bearbeiten“ wählen Sie Startseite aus dem Menü „Art der Seite“. Wählen Sie im Fenster „Art der Seite“ das Kontrollkästchen „Startseite“ aus. In einer Meldung wird darauf hingewiesen, dass Sie das Feld nicht deaktivieren können, und Sie werden aufgefordert, eine andere Seite als Startseite festzulegen.

Wählen Sie OK, um die Mitteilung zu schließen. Legen Sie dann eine andere Seite als Startseite fest. Siehe [Startseite ändern](#). Wenn Sie diese Seite noch immer löschen möchten, können Sie dies jetzt tun.

Whiteboard-Seiten

Whiteboards können zum Zeichnen, zur Zusammenarbeit und zum Austausch genutzt werden.

Eine Whiteboard-Seite erstellen

Um eine Whiteboard-Seite zu erstellen, erstellen Sie eine neue Seite mit einer einzigen Taste und wählen Sie die Tastenfunktion „Whiteboard“ aus.\

1. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
2. Wählen Sie die Taste aus, die Sie mit Ihrer Whiteboard-Seite verknüpfen möchten. Wählen Sie Taste bearbeiten.
3. Fügen Sie eine Beschriftung hinzu, scrollen Sie zum Abschnitt „Tastenfunktion“ und ersetzen Sie die vorhandene Funktion durch Seite anzeigen.
4. Wählen Sie das Pluszeichen + oben rechts, um eine Whiteboard-Seite hinzuzufügen.
5. Geben Sie einen Seitennamen ein und wählen Sie 1 Zeile und 1 Spalte aus.
6. Wählen Sie Sichern und dann Keine Animation und dann erneut Sichern.
7. Wählen Sie Fertig, um den Editiermodus zu verlassen, und wählen Sie die Taste, um zur neuen Whiteboard-Seite zu gelangen.
8. Wählen Sie Menü, dann Seite bearbeiten und danach Neue Taste erstellen.
9. Scrollen Sie im Fenster „Taste bearbeiten“ zum Abschnitt „Tastenfunktion“ und ersetzen Sie die Aktion „Mitteilung ausgeben“ durch die Aktion „Whiteboard“.
10. Wählen Sie Sichern. Wählen Sie Fertig, um den Editiermodus zu beenden.
11. Verwenden Sie die Whiteboard-Werkzeuge oben auf der Seite, um zu zeichnen.

Whiteboard-Werkzeuge



Zurück

Wählen Sie Zurück, um zur Seite zurückzukehren, die die Taste enthält, die zum Whiteboard führt.

Whiteboard

Wählen Sie Whiteboard, um ein Menü zu öffnen. Wählen Sie das Whiteboard außerhalb der Zeichnung, um ein Menü zu schließen. Wenn keine Zeichnung auf dem Whiteboard vorhanden ist, stehen die Optionen Farbe, Strichstärke, Speichern und Laden zur Verfügung.

Farbe: Wählen Sie Schwarz, Rot, Grün, Blau oder Gelb.

Breite: Wählen Sie Dünn, Normal oder Dick, um die Stärke (Dicke) des nächsten Strichs festzulegen, den Sie zeichnen.

Speichern: Speichern Sie die aktuelle Zeichnung.

Laden: Laden Sie eine gespeicherte Zeichnung.

Wenn sich eine Zeichnung auf dem Whiteboard befindet, stehen weitere Optionen zur Verfügung: Löschen, Rückgängig und „Radieren“.

Löschen: Entfernt die gesamte Zeichnung.

Rückgängig: Entfernt die letzte Hinzufügung oder Änderung.

Radieren: Entfernt einen Teil der Zeichnung. Wenn Sie „Radieren“ auswählen, wird der Radierer ausgewählt.

Rückgängig-Pfeil

Mit dem Rückgängig-Pfeil können Sie die letzte Hinzufügung oder Änderung an einer Zeichnung rückgängig machen.

Radierwerkzeug

Mit dem Radierwerkzeug können Sie einen Teil der Zeichnung löschen. Wählen Sie dieses Werkzeug aus und tippen Sie dann auf einen beliebigen Teil der Zeichnung, um ihn auszuradieren. Sie können das Tool auch über einen Teil der Zeichnung ziehen, um diesen Teil auszuradieren. Um die Breite des Radierers zu ändern, tippen

Sie einmal auf das Steuerelement, um die Breite von Dünn auf Normal zu ändern; tippen Sie erneut auf das Steuerelement, um die Breite auf Dick zu ändern.



Farbauswahlwerkzeug

Verwenden Sie das Farbauswahlwerkzeug, um die Farbe des nächsten Strichs auszuwählen, den Sie zeichnen. Wenn eine Farbe ausgewählt wird, ändert sich das Farbrechteck in ein Dreieck. Die Breite des Dreiecks ändert sich, wenn Sie die Einstellung „Breite“ ändern.

Menü

Wählen Sie Menü > Einstellungen und scrollen Sie zum Abschnitt „Whiteboard“, um die Whiteboard-Einstellungen zu ändern.

Whiteboard-Einstellungen anpassen

Um die Einstellungen des Whiteboards zu ändern, wählen Sie Menü > Einstellungen und scrollen Sie zum Abschnitt „Whiteboard“.

Zeichnen in der geteilten Ansicht deaktivieren

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, kann auf der Whiteboard-Seite nicht gezeichnet werden, wenn die geteilte Ansicht in iOS aktiviert ist.

Zeichnung in der geteilten Ansicht skalieren

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Whiteboard-Zeichnungen entsprechend der relativen Größe der App-Seite skaliert, wenn die geteilte Ansicht in iOS aktiviert ist.

Letzte Zeichnung automatisch laden

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird beim Öffnen des Whiteboards die zuletzt erstellte Zeichnung angezeigt.

Zeichnung automatisch sichern

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Whiteboard-Zeichnungen automatisch gespeichert.

KI-Funktionen

Um die KI-Funktionen in Unity AAC zu aktivieren, muss das Gerät auf iOS/iPadOS 26 oder höher aktualisiert sein und mit Apple Intelligence™ kompatibel sein. Ob Ihr Gerät mit Apple Intelligence kompatibel ist, erfahren Sie in der Tabelle auf dieser Website: apple.com/de/apple-intelligence/.

KI-Funktionen aktivieren

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf iOS/iPadOS 26 oder höher aktualisiert ist.
2. Gehen Sie zu den iPadOS-Einstellungen und aktivieren Sie Apple Intelligence.
3. In der App gehen Sie zu Menü > Einstellungen > KI-Funktionen > Funktionen aktivieren.
4. Wählen Sie unterhalb von „Möchten Sie fortfahren?“ Ja aus, um die Optionen „Textfenster ändern“ und KI-Bilderstellung anzuzeigen.

Tipp: Wenn Sie mit der Auswahl der KI-Optionen fertig sind, wählen Sie so lange den Zurück-Pfeil , bis Sie zum Hauptfenster der Einstellungen gelangen.

Wählen Sie anschließend das Häkchen  aus, um die Einstellungen zu schließen.

KI zum Bearbeiten von Mitteilungen im Textfenster verwenden

Sie können KI einsetzen, um Grammatik-, Zeichensetzung- und Rechtschreibfehler in Textfenster-Texten zu korrigieren.

1. Wählen Sie Textfenster ändern. Es werden zwei Optionen angezeigt: KI-Bearbeitung der Mitteilung und KI-Übersetzung.
2. Aktivieren Sie KI-Bearbeitung der Mitteilung. Es werden zwei weitere Optionen angezeigt: KI-Taste konfigurieren und Kreative KI.
3. Wählen Sie KI-Taste konfigurieren. Es werden zwei weitere Optionen angezeigt: Aus und KI-Bearbeitung der Mitteilung.
4. Wählen Sie KI-Bearbeitung der Mitteilung. Rechts neben der Option

erscheint ein Häkchen und die Taste zur KI-Bearbeitung  wird im Textfenster angezeigt.

5. Geben Sie den Text im Textfenster wie gewohnt ein. Wenn Sie möchten, dass die KI Ihren Text auf Fehler überprüft, wählen Sie die Taste zur KI-Bearbeitung. Wenn Fehler vorhanden sind, werden sie von der KI korrigiert.

Tipps:

- Wenn die KI den Text ändert, wird die Taste KI bearbeiten durch die Taste „Rückgängig“  ersetzt. Wenn Sie die Änderungen nicht beibehalten möchten, wählen Sie die Taste „KI rückgängig“, um zu Ihrem ursprünglichen Text zurückzukehren.
- Wenn Sie die KI-Bearbeitung von Textfenster-Texten vorübergehend deaktivieren und die KI-Taste ausblenden möchten, wählen Sie Aus. Wenn Sie die KI-Bearbeitung deaktivieren möchten, deaktivieren Sie „KI-Bearbeitung der Mitteilung“ unter „Textfenster ändern“.

KI nutzen, um Mitteilungen im Textfenster zu übersetzen.

Sie können KI verwenden, um Textfenster-Text in jede von einer Apple-Stimme unterstützte Sprache/Region zu übersetzen.

1. Wählen Sie Textfenster ändern. Es werden zwei Optionen angezeigt: KI-Bearbeitung der Mitteilung und KI-Übersetzung.
2. Aktivieren Sie KI-Übersetzung, um eine Option zum Konfigurieren der KI-Taste anzuzeigen.
3. Wählen Sie KI-Taste konfigurieren. Es werden zwei weitere Optionen angezeigt: Aus und KI-Übersetzung.
4. Wählen Sie KI-Übersetzung. Rechts neben der Option erscheint ein Häkchen und die Option „Sprache/Region hinzufügen“ wird angezeigt.
5. Wählen Sie „Sprache/Region hinzufügen“, um ein Fenster mit der Bezeichnung „Sprache & Region“ zu öffnen. Die Standardsprache/-region ist mit einem Häkchen gekennzeichnet.
6. Um eine Sprache zur Liste hinzuzufügen, wählen Sie das Pluszeichen (+) oben rechts im Fenster und anschließend die gewünschte Sprache. Die betreffende Sprache wird in der Liste mit einem Häkchen angezeigt.
7. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um weitere Sprachen hinzuzufügen, die Sie für Übersetzungen verwenden möchten.

8. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie das Häkchen  und dann die Zielsprache aus. Die von Ihnen hinzugefügte Sprache wird nun in der Option „KI-Übersetzung“ mit einem Häkchen angezeigt und die Taste „KI-Übersetzung“  wird im Textfenster angezeigt.
9. Geben Sie den Text wie gewohnt in das Textfenster ein und wählen Sie dann die Taste „KI-Übersetzung“. Der von Ihnen eingegebene Text wird im Textfenster übersetzt. Wählen Sie das Textfenster-Option aus, um die übersetzten Wörter vorlesen zu lassen.
Hinweis: Standardmäßig ist eine Apple-Stimme eingestellt, diese kann aber in den App-Einstellungen unter „Sprache“ geändert werden.


Tipps:

- Wenn die KI den Text übersetzt, wird die Taste „KI bearbeiten“ durch die Taste „KI rückgängig“ ersetzt. Wenn Sie die Übersetzung nicht beibehalten möchten, wählen Sie die Taste „KI rückgängig“, um zu Ihrem ursprünglichen Text zurückzukehren.
- Sie können die Sprache für KI-Übersetzung jederzeit ändern, indem Sie zu Menü > Einstellungen > Textfenster bearbeiten > Taste „Konfigurieren“ > KI-Übersetzung gehen und eine andere Sprache/Region wählen.
- Wenn Sie sowohl KI-Bearbeitung der Mitteilung als auch KI-Übersetzung aktivieren, werden die Änderungen vor der Übersetzung vorgenommen. Lesen Sie hierzu die im Menü „Textfenster ändern“ festgelegten Sequenzregeln.

KI zur Erzeugung von Bildern für Tasten verwenden

Sie können KI verwenden, um basierend auf Ihren Eingaben ein neues Bild zu erzeugen.

1. Aktivieren Sie KI-Bilderstellung in den App-Einstellungen und wählen Sie dann das Häkchen .
2. Gehen Sie zu der Seite, auf der Sie das KI-Bild erstellen möchten.
3. Wählen Sie Menü und dann Seite bearbeiten.
4. Wählen Sie die Taste, die Sie bearbeiten möchten, und dann Taste bearbeiten.
5. Wählen Sie im Fenster „Taste bearbeiten“, die Option Bild generieren, um das Fenster KI-Bildgenerierung zu öffnen.

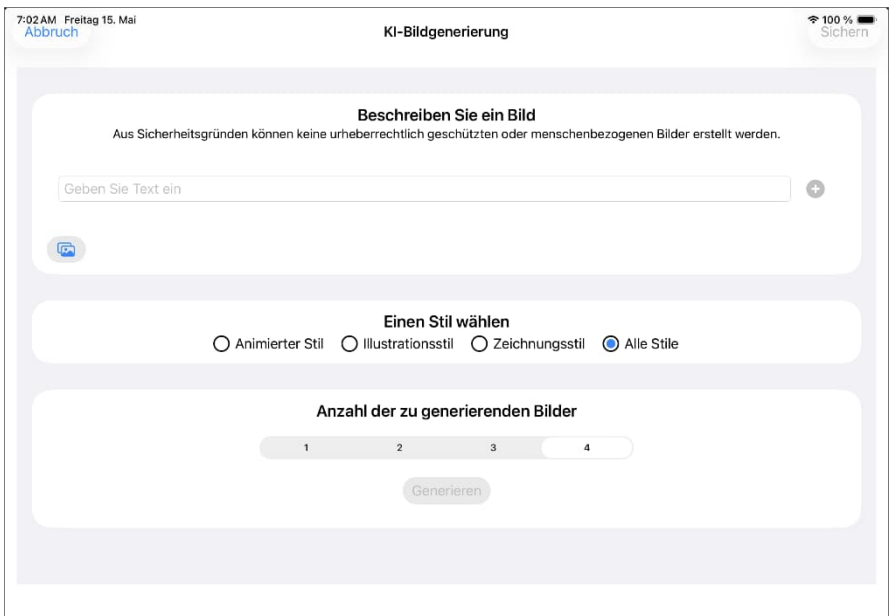

6. Geben Sie eine Beschreibung des gewünschten Bildes ein, wählen Sie einen Bildstil, die gewünschte Anzahl an Bildern und klicken Sie dann auf Erstellen.

Nutzen Sie KI, um Bilder für Schaltflächen zu generieren

Sie können in einem Vokabular eine benutzerdefinierte Seite mithilfe einer KI-Funktion erstellen. Falls Sie es vorziehen, eine benutzerdefinierte Seite manuell zu erstellen, siehe „Eine benutzerdefinierte Seite durch manuelles Hinzufügen von Wörtern erstellen“.

Im oberen linken Bereich des Bildschirms ermöglicht Ihnen ein Indexsymbol, den linken Bereich ein- oder auszublenden, um die KI-Funktionalität zu nutzen, sofern die KI aktiviert ist.



1. Gehen Sie zu Menü > Einstellungen > KI-Funktionen > KI-Funktionen aktivieren.
2. Wählen Sie KI-Seitengenerierung.
3. Wählen Sie Menü und Seite bearbeiten.
4. Wählen Sie Menü und Neue Seite. Ein Menü öffnet sich.
5. Wählen Sie Erstellung benutzerdefinierter Seiten.
6. Geben Sie im linken Bereich ein Thema ein.
7. Wählen Sie die Anzahl der zu generierenden Wörter aus.
8. Wählen Sie Generieren. Auf der rechten Seite öffnet sich eine Wortliste.

Abbruch

Erstellung benutzerdefinierter Seiten

Sichern

KI-gestützte Worterstellung

tiere

7

8

9

10

11

12

13

Anzahl der zu erstellenden Wörter

Aufgrund von Duplikaten oder begrenzten Optionen erhalten Sie möglicherweise weniger Vorschläge als gewünscht. Passen Sie das Schema an und versuchen Sie es erneut.

Generieren

KI-Vorschläge zurücksetzen

Dies könnte hilfreich sein.

Fügen Sie Ihr(e) eigenes/eigenen Wort(e) hinzu

Wortliste:

5 von maximal 58 Wörtern

Fertig

Auswahl löschen

Alles löschen

Dupliziertes Wort löschen

Katze

Sequenz anzeigen

Frosch

Sequenz anzeigen

Schlange

Sequenz anzeigen

Fledermaus

Sequenz anzeigen

Unity AAC Gebrauchsanweisung

149

Sprachentwicklung mithilfe der Sprachdatenaufzeichnung verfolgen

Wenn die Sprachdatenaufzeichnung aktiviert ist, erfasst das Gerät Sprachnutzungsdaten einer Person, die Sie entweder zur Analyse auf die Realize Language-Website hochladen oder in einer Datei speichern und manuell analysieren können. Die Sprachdatenaufzeichnung hilft Ihnen, die Fortschritte einer Person bei der Sprachentwicklung zu verfolgen. Mit diesem Prozess können Sie die Nutzung des Geräts durch die Person überwachen, messen und optimieren.

Hinweis: Wenn Sie die Website von Realize Language zur Datenanalyse nutzen möchten, müssen Sie ein Abonnement abschließen und ein Konto einrichten. Kunden außerhalb der USA wenden sich bitte an ihren lokalen Vertriebspartner, um Informationen zur Einrichtung eines Kontos zu erhalten.

Verwendung von Realize Language

Realize Language ist ein abonniertes Online-Service, der Informationen strukturiert und analysiert und die Ergebnisse in leicht verständlichen Grafikformaten präsentiert, die wertvolle Einblicke in die Sprachentwicklung der einzelnen Benutzer bieten. Mit diesem Dienst können Sie von Ihrem Computer aus Folgendes tun:

- den Fortschritt und die Kommunikationsentwicklung der Person im Zeitverlauf verfolgen
- verschiedene Aspekte der Kommunikation automatisch vergleichen
- eine detaillierte Leistungsübersicht erstellen
- Informationen mit anderen teilen
- für alle verständliche Berichte schnell erstellen

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Realize Language unter realizelanguage.de/info/

Sprachdatenaufzeichnung aktivieren

Wenn die Sprachdatenaufzeichnung aktiviert ist, erfasst Ihr Gerät Sprachnutzungsdaten, die Sie zur webbasierten Analyse auf die Realize Language-Website hochladen können.

Wichtig:

- Wenn Sie die Website von Realize Language zur Datenanalyse nutzen möchten, richten Sie eine Person ein, bevor Sie mit der Datenerfassung beginnen.
 - Es ist nicht möglich, ein Gerät mit mehreren Personen gleichzeitig auf einem Realize-Konto zu verknüpfen. Wenn Sie ein Gerät zu Evaluierungszwecken verwenden und es von mehreren Klienten gemeinsam genutzt wird, umfassen die erhobenen Daten alle von allen Klienten verwendeten Wörter. Es wird daher empfohlen, dass ein Klient ein bestimmtes Gerät verwendet, wenn Sie die Realize Language-Website zur Analyse der Daten des betreffenden Klienten nutzen möchten.
 - Mit einem Realize Language-Konto können Sie eine Person mit mehreren Geräten verknüpfen. Wenn ein Klient beispielsweise ein Gerät in der Schule, ein anderes Gerät zu Hause und ein weiteres Gerät in der Öffentlichkeit verwendet, können Sie all diese Geräte mit dem Realize Language-Konto des betreffenden Klienten verknüpfen.
1. Wählen Sie in Unity AAC Menü > Einstellungen, und scrollen Sie zum Abschnitt „Sprachdatenaufzeichnung“.
 2. Verwenden Sie den Umschalter, um die Sprachdaten aufzeichnen EINZUSCHALTEN. Wenn die Sprachdatenaufzeichnung aktiviert ist, erscheint das Sprachdatenaufzeichnungssymbol  im Textfenster.

Privatsphärenpasswort erstellen

Die Sprachdatenaufzeichnung bietet die Möglichkeit, ein Privatsphärenpasswort zu erstellen, um die erhobenen Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Wichtig: Wenn Sie ein Privatsphärenpasswort erstellen, notieren Sie es oder bewahren Sie es auf andere Weise sicher auf. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen oder verloren haben, müssen Sie das Verfahren unter „[Vergessenes oder verloren gegangenes Privatsphärenpasswort](#)“ befolgen.

1. Wählen Sie Menü > Einstellungen, und scrollen Sie zum Abschnitt „Sprachdatenaufzeichnung“.
2. Wählen Sie das Passwortfeld rechts neben Privatsphärenpasswort um eine Tastatur zu öffnen.
3. Geben Sie das gewünschte Privatsphärenpasswort ein, und wählen Sie das Häkchen . Daraufhin wird die Eingabeaufforderung „Neues Passwort bestätigen“ angezeigt.
4. Geben Sie das Passwort erneut ein, und wählen Sie die Eingabe-Taste. Sie erhalten eine Bestätigungsmeldung, dass Ihr neues Passwort eingestellt ist.
5. Wählen Sie OK, um die Mitteilung zu schließen.

Ihr Privatsphärenpasswort ändern oder entfernen

Standardmäßig geben Sie jedes Mal, wenn Sie Daten in einer Datei speichern, ein Passwort ein. Durch die Eingabe eines Passworts wird der Datenschutz gewährleistet. Nur Sie können die Daten einsehen. Sie können dieses Privatsphärenpasswort beliebig oft ändern, oder Sie können angeben, dass kein Privatsphärenpasswort verwendet werden soll.

So ändern Sie Ihr Privatsphärenpasswort:

1. Wählen Sie Menü > Einstellungen, und scrollen Sie zum Abschnitt „Sprachdatenaufzeichnung“.
2. Wählen Sie das Passwortfeld rechts neben Privatsphärenpasswort um eine Tastatur zu öffnen.
3. Geben Sie Ihr altes Privatsphärenpasswort ein, und wählen Sie die Eingabe-Taste. Im Passwortfeld wird ein Cursor angezeigt.

4. Verwenden Sie die Rücktaste  , um das Feld „Privatsphärenpasswort“ zu löschen.
5. Geben Sie Ihr neues Passwort ein, und wählen Sie das Häkchen .
6. Daraufhin wird die Eingabeaufforderung „Neues Passwort bestätigen“ angezeigt. Geben Sie Ihr neues Privatsphärenpasswort ein, und wählen Sie die Eingabe-Taste.
7. Daraufhin wird die Mitteilung „Neues Passwort“ angezeigt. Wählen Sie OK, um die Mitteilung zu schließen.

So entfernen Sie Ihr Privatsphärenpasswort:

Wenn Sie nicht jedes Mal, wenn Sie Daten in einer Datei speichern, ein Passwort eingeben möchten, gehen Sie wie folgt vor. Beachten Sie jedoch, dass Sie dadurch auch den Datenschutz verlieren, den ein Passwort bietet.

1. Wählen Sie Menü > Einstellungen, und scrollen Sie zum Abschnitt „Sprachdatenaufzeichnung“.
2. Wählen Sie das Passwortfeld rechts neben Privatsphärenpasswort um eine Tastatur zu öffnen.
3. Geben Sie Ihr altes Privatsphärenpasswort ein, und wählen Sie die Eingabe-Taste. Im Passwortfeld wird ein Cursor angezeigt.
4. Drücken Sie die Rücktaste  auf der Tastatur, um das Feld „Privatsphärenpasswort“ zu löschen, und wählen Sie das Häkchen .
5. Daraufhin wird die Meldung „Privatsphärenpasswort gelöscht“ angezeigt. Wählen Sie OK, um die Mitteilung zu schließen.

Vergessenes oder verloren gegangenes Privatsphärenpasswort

Wenn Sie Ihr Privatsphärenpasswort für die Sprachdatenaufzeichnung vergessen oder verloren haben, gehen Sie folgendermaßen vor.

Wichtig: Durch diesen Vorgang werden alle aktuell protokollierten Daten entfernt, um den Schutz der Daten des Gerätebenutzers zu gewährleisten.

1. Legen Sie eine Sicherungskopie Ihrer Vokabulardatei an.
Siehe [Vokabulardateien übertragen oder sichern](#).
2. Löschen Sie die Unity AAC-App von Ihrem Gerät.
3. Installieren Sie die Unity AAC-App neu.
4. Verwenden Sie zur Erstellung eines neuen Privatsphärenpasswortes das Verfahren unter [Privatsphärenpasswort erstellen](#).

Daten zu Realize Language hochladen

Hinweis: Dieser Abschnitt gilt nur für nicht dedizierte Geräte.

1. Erstellen Sie unter realizelanguage.de/info/ ein Realize Language-Konto.
2. Wählen Sie Menü > Einstellungen, und scrollen Sie zum Abschnitt „Sprachdatenaufzeichnung“.
3. Wählen Sie Realize Language™ einrichten und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.
4. Wählen Sie die Aktueller Benutzer für den Benutzer aus, für den Sie Daten hochladen möchten.
5. Wählen Sie Jetzt hochladen. Die Meldung „Datei erfolgreich aktualisiert“ erscheint.
6. Wählen Sie Speichern.

Hinweis: Ihre Realize Language-Konto-E-Mail-Adresse und Ihr Realize Language-Kontopasswort werden im Realize Language-Einrichtungsfenster gespeichert. Für zukünftige Uploads müssen Sie lediglich die Person aus der Liste „Aktueller Benutzer“ auswählen.


Nutzungsdaten löschen

So löschen Sie Nutzungsdaten für den aktuellen Benutzer:

1. Wählen Sie Menü > Einstellungen, und scrollen Sie zum Abschnitt „Sprachdatenaufzeichnung“.
2. Wählen Sie die Taste Löschen.
3. Die Eingabeaufforderung für das Privatsphärenpasswort und die Tastatur werden angezeigt. Geben Sie Ihr Privatsphärenpasswort ein, und wählen Sie die Eingabe-Taste.
4. Daraufhin wird die Meldung „Möchten Sie die Sprachdaten wirklich löschen?“ angezeigt. Wählen Sie Ja, um die Sprachdaten zu löschen.
5. Danach wird die Meldung „Sprachdaten gelöscht“ angezeigt. Wählen Sie OK, um die Mitteilung zu schließen.

Anmeldedaten für das Realize Language-Konto löschen

Wenn Sie die Anmeldedaten für das Realize Language-Konto löschen möchten, wählen Sie im Anmeldefenster „Realize Language“ die Taste Konto entfernen. Beispiel: Sie sind Arzt und möchten die Verbindung zu Ihrem Realize Language-Konto trennen, bevor Sie ein Gerät an einen Patienten ausleihen. Auf diese Weise wird die E-Mail-Adresse Ihres Kontos nicht angezeigt, und Ihr Konto sammelt keine Daten, die für den betreffenden Patienten erfasst wurden.

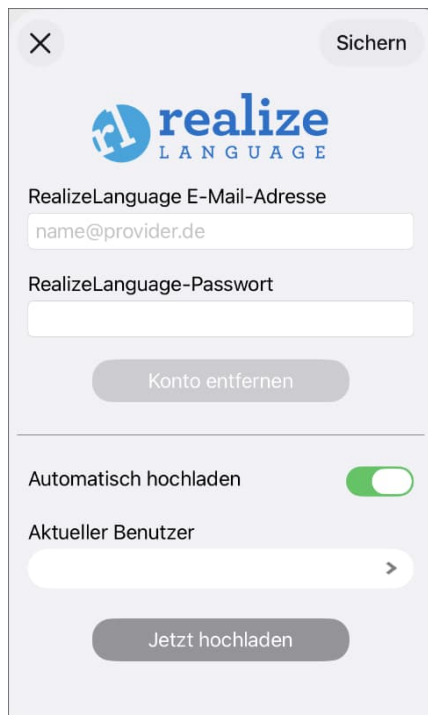

The screenshot shows the Realize Language login interface. At the top left is a close button (X) and at the top right is a 'Sichern' button. The Realize Language logo is centered. Below it, the 'RealizeLanguage E-Mail-Adresse' field contains 'name@provider.de'. The 'RealizeLanguage-Passwort' field is empty. A 'Konto entfernen' button is highlighted with a grey background. Below this is a section with 'Automatisch hochladen' (checked) and 'Aktueller Benutzer' (empty). At the bottom is a 'Jetzt hochladen' button.

Hinweis: Die Taste Konto entfernen ist nur aktiv, wenn Sie Ihre Anmeldedaten in die E-Mail- und Passwort-Felder für Realize Language eingegeben haben.

Wenn Sie die Taste Konto vergessen wählen:

- Sie werden aufgefordert zu bestätigen, dass Sie Ihre Anmeldedaten für Realize Language wirklich löschen möchten.
- Wenn Sie dies bestätigen, werden Ihre gespeicherten Anmeldedaten für Realize Language gelöscht, Automatischen Upload aktivieren wird deaktiviert und das Anmeldefenster wird geschlossen.

Aufgezeichnete Sprachdaten manuell exportieren

1. Wählen Sie Menü > Einstellungen, und scrollen Sie zum Abschnitt „Sprachdatenaufzeichnung“.
2. Wählen Sie die Taste Export für die zu exportierenden Sprachdaten. Die folgende Eingabeaufforderung wird angezeigt:
„Nach dem Herunterladen oder dem Export wird Ihre Sprachdatendatei nur durch die Sicherheitseinrichtungen auf Ihrem Gerät oder in der verwendeten Anwendung eines Drittanbieters geschützt.“
3. Wählen Sie Ja.
4. Wählen Sie die gewünschte Exportoption im Protokolldateifenster aus.

Telefongespräche – Telefonie

Wichtig:

- Sie müssen die Unity AAC-App auf einem nicht dedizierten Gerät verwenden. Wenn Sie ein dediziertes Gerät verwenden, können Sie die Telefonfunktion nicht verwenden.
- Sie und alle Personen, die Sie anrufen, müssen über ein FaceTime®-Konto verfügen.

Während eines Telefonanrufs wird die übliche Sprachausgabe in der App auf eine Telefon-/FaceTime-Stimme umgeschaltet. Wenn Sie den Anruf beenden, schaltet die Sprechstimme wieder auf Ihre übliche Stimme in der App um.

So wählen oder ändern Sie Ihre Telefonstimme:

1. In Unity AAC wählen Sie Menü > Einstellungen und scrollen Sie zum Abschnitt „Sprache“. Wählen Sie Telefon-/FaceTime-Stimme, um eine Liste der verfügbaren Stimmen zu öffnen. Die zurzeit ausgewählte Stimme ist mit einem Häkchen gekennzeichnet.
2. Um die Stimme zu ändern, Sie das Wiedergabesymbol, um sich anzuhören, wie eine Stimme klingt. Hören Sie sich bei Bedarf mehrere Stimmen an.
3. Wenn Sie die gewünschte Stimme gefunden haben, wählen Sie das Apple-Symbol , um sie herunterzuladen und zu installieren.

Tipp: Wenn Sie möchten, dass Wörter im Textfenster beim Aussprechen während eines Telefonanrufs markiert werden, lesen Sie den Abschnitt [Gesprochene Wörter bei Telefonaten/in FaceTime hervorheben](#).

Soziale Netzwerke

Sie können E-Mail, SMS, Twitter™ und Facebook® direkt in der App verwenden. Bevor Sie einen dieser Dienste nutzen können, müssen Sie auf Ihrem Gerät bei diesen Diensten angemeldet sein.

1. In der Unity AAC-App wählen Sie Menü > Einstellungen und scrollen dann zum Abschnitt „Soziale Netzwerke“.
2. Schalten Sie Soziale Netzwerke erlauben EIN.
3. Verlassen Sie das Menü durch Auswahl des Häkchens .
4. Nachdem Sie Ihre Mitteilung eingegeben haben, berühren und halten Sie das Textfenster.
5. Wählen Sie Teilen.
6. Wählen Sie den Service, den Sie verwenden möchten. Nachdem der Dienst geöffnet wurde, wird Ihr Text automatisch in der betreffenden App eingestellt. Der gesamte seit der letzten Auswahl der Taste „Löschen“ gesprochene Text wird kopiert, unabhängig davon, ob er im Textfenster angezeigt wird oder nicht.

Acapela Sprach-Smileys

Die Acapela-Group hat die Möglichkeit geschaffen, spezielle Geräusche und Ausrufe wiederzugeben.

Ton hinzufügen

Es werden Laute mit der Stimme des Sprechers erzeugt, etwa Lachen, Atmen, Niesen, Husten oder andere Geräusche, die unsere Stimme erzeugen kann. Dadurch werden Geräusche nachgeahmt, die wir im Alltag von uns geben. Laute stehen immer zwischen zwei Rautenzeichen; zum Beispiel: #LACHEN02# in Großbuchstaben und manchmal gefolgt von Zahlen, wenn es mehrere Versionen derselben Art gibt. Kinderstimmen haben mehr Laute als Erwachsenenstimmen.

Ausrufe umfassen eine Vielzahl von Buchstaben und Symbolen. Geben Sie genau das ein, was Sie sehen.

Stimm-Smiley finden

So finden Sie die Liste der Acapela-Stimm-Smiley-Befehle:

1. Gehen Sie zu acapela-group.com/de/voices/vocal-smileys-examples/
2. Wählen Sie den Link zur gewünschten Sprache aus.

Wichtig: Die von Ihnen gewählte Sprache muss mit der Sprache der von Ihnen verwendeten Stimme übereinstimmen.


3. Wählen Sie den gewünschten Stimm-Smiley aus.

Beispiel: Smiley-Gesicht und Lachen hinzufügen

Eine Taste kann mit dem Befehl in der Mitteilung programmiert werden. Wenn Sie jedoch die Aktion „Mitteilung ausgeben“ verwenden, erscheint der Befehl im Textfenster, was nicht optimal ist. Eine bessere Lösung wäre es vielleicht, eine Taste mit einem Emoticon-Symbol in die Mitteilung einzufügen.

Sie könnten beispielsweise ein Smiley-Symbol verwenden. Beachten Sie, dass Sie möglicherweise zu Einstellungen > Allgemein > Tastatur gehen und dort die Emoji-Tastatur hinzufügen müssen, damit Sie Emoticon-Symbole eingeben können. Wenn die Taste mit dem Emoji und der Sprachmitteilung eingerichtet ist, gehen Sie zu „Ausspracheregeln“ und fügen Sie eine Aussprache für das Smiley-Emoji hinzu. Geben Sie einen Befehl wie z. B. #LACHEN02# zur Aussprache ein.

Um die Aussprachebearbeitung zu öffnen, wählen Sie Menü und Aussprache bearbeiten. Wählen Sie das Pluszeichen +, um dem Wortfeld das gleiche Emoji hinzuzufügen, das auf der Taste verwendet wird, und fügen Sie dem Feld „Aussprache“ den Befehl hinzu (zum Beispiel #LACHEN02#).

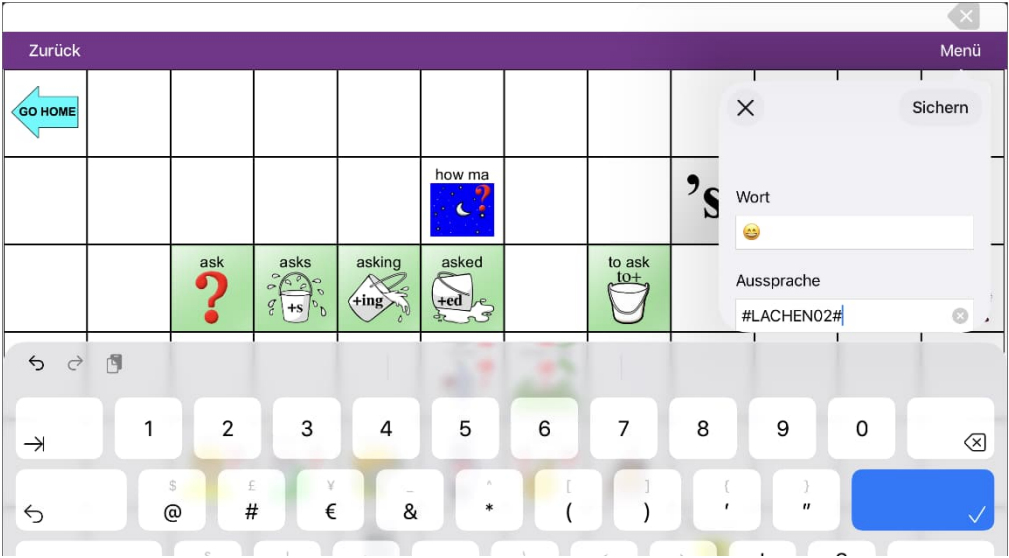

Wenn Sie nun die Taste berühren, erscheint das Emoji im Textfenster und ein Lachgeräusch ist zu hören.

Probleme und Lösungen

Probleme mit der App-Performance

Wenn Ihre App bisher gut funktioniert hat, Sie aber in letzter Zeit Probleme hatten, probieren Sie eine der folgenden Optionen aus. Wenn Ihr Problem dadurch nicht behoben werden kann, kontaktieren Sie uns bitte unter support@aacapps.com.

Schließen Sie die App, und öffnen Sie sie erneut

1. Wenn Ihr Gerät über eine Startseiten-Taste verfügt, drücken Sie diese zweimal, um zu sehen, ob alle Apps geöffnet werden. Wenn es keine Startseiten-Taste gibt, wischen Sie in die Mitte des Bildschirms von unten nach oben.
2. Wischen Sie alle geöffneten Apps nach oben, um sie zu beenden.
3. Öffnen Sie die App erneut.

Aktualisieren Sie die iOS-Software und Ihre App

So aktualisieren Sie die iOS-Software:

1. Wählen Sie in den iOS-Einstellungen die Option Software-Update aus.
2. Wenn ein Update verfügbar ist, wählen Sie Herunterladen und Installieren.

So aktualisieren Sie Ihre App:


1. Gehen Sie zum App Store, und wählen Sie das Kontosymbol oben rechts aus.
2. Sehen Sie unter Verfügbare Updates nach, ob ein Update für Ihre App verfügbar ist. Wenn ja, wählen Sie Update.

Vokabulardateien (.ce) werden in der falschen iOS-App geöffnet

Da alle PRC-Salttillo iOS-Apps das .ce-Dateiformat für Vokabulardateien verwenden, verknüpfen die iOS/iPadOS-Geräte alle Vokabulardateien mit derselben Standard-App. Wenn Sie mehrere Apps von PRC-Salttillo auf Ihrem iOS-Gerät verwenden (z. B. LAMP Words for Life und TouchChat), werden alle Vokabulardateien standardmäßig nur in einer dieser Apps geöffnet (wahrscheinlich in der ersten App, die Sie auf das Gerät heruntergeladen haben). Um eine Vokabulardatei in der gewünschten App zu öffnen, befolgen Sie die Anweisungen für eines der folgenden Szenarien, um die entsprechende App auszuwählen, bevor Sie die Datei öffnen.

Szenario 1: Auswahl der App, die Sie beim Importieren einer Vokabulardatei verwenden möchten

1. Halten Sie die Datei gedrückt.
2. Wählen Sie Öffnen mit und dann die richtige App für die betreffende Vokabulardatei.

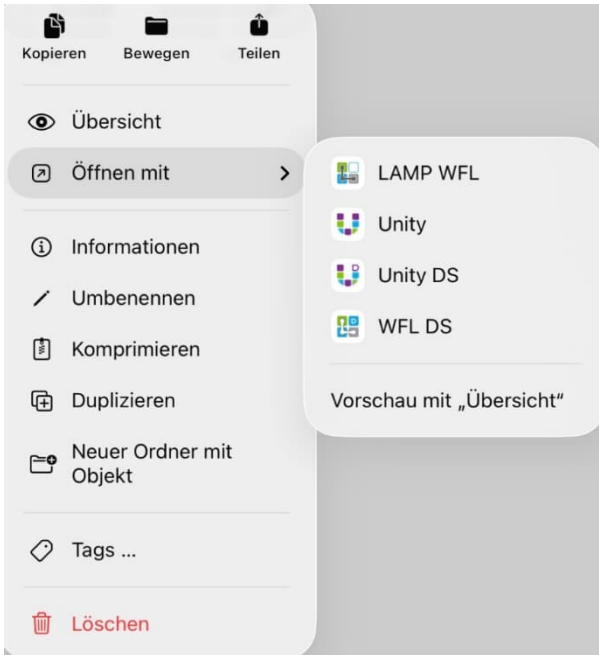


3. Wählen Sie Ja, wenn Sie in einer Meldung gefragt werden, ob Sie die Datei in die App importieren möchten.
4. Geben Sie im Fenster „Vokabular importieren“ Informationen ein und speichern Sie sie. Die Datei wird Ihrer Vokabularliste in der von Ihnen ausgewählten App hinzugefügt.

Szenario 2: Auswahl der gewünschten App, wenn Sie eine Datei per AirDrop senden

Wenn Sie eine Datei per AirDrop senden, zeigt iOS/iPadOS die Standard-App an, in der die Datei geöffnet wird. Wenn dies nicht die App ist, in der Sie diese Vokabulardatei speichern möchten:

1. Wählen Sie das Symbol Öffnen  in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, um zusätzliche App-Optionen anzuzeigen.

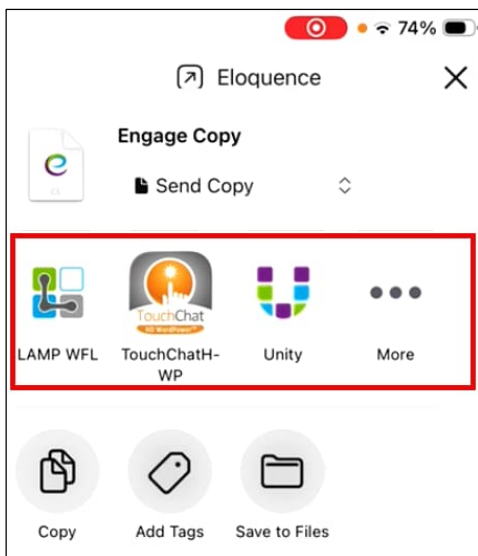

2. Wischen Sie durch die App-Optionen, und wählen Sie die richtige App für diese Vokabulardatei aus.
3. Wählen Sie Ja, wenn Sie in einer Meldung gefragt werden, ob Sie die Datei in die App importieren möchten.
4. Geben Sie im Fenster „Vokabular importieren“ Informationen ein und speichern Sie sie. Die Datei wird Ihrer Vokabularliste in der von Ihnen ausgewählten App hinzugefügt.

Für Schulen/Organisationen

Probleme mit der App-Funktionalität aufgrund eingeschränkter Websites

Wenn Sie ein MDM-System (Mobile Device Management) zur Verwaltung vieler Geräte verwenden, können Einschränkungen gelten, die bestimmte App-Funktionen blockieren. Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Websites auf der Zulassungsliste stehen:

*.ishareprc.com | *.realizelanguage.com | *.ishareservices.com |
*.touchchatapp.com | *.prentrom.com | *.dropbox.com | *.itunes.apple.com |
*.youtube.com | *.googlevideo.com | *.prc-salttillo.com | *.thevoicekeeper.com |
*.s3.amazonaws.com | *.lampwflapp.com | *.unityaacapp.com |
*.dialogueaacapp.com

Zusätzlich zum Hinzufügen dieser Websites zur Zulassungsliste empfehlen wir, sowohl Port 80 (http) als auch Port 433 (https) zu öffnen.

Konformitäts-Informationen

Gerätekonformität

Federal Communications Commission (FCC) Warnung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) Dieses Gerät muss jegliche empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen könnten.

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von PRC-Salttillo genehmigt wurden, könnten die Befugnis des Nutzers zur Nutzung des Geräts aufheben.

Hinweis: Diese Ausrüstung wurde getestet und hat festgestellt, dass sie den Grenzwerten für ein Klasse-B-Digitalgerät gemäß Teil 15 der FCC-Regeln entspricht. Diese Grenzen sind darauf ausgelegt, einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn diese Ausrüstung schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, die durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden können, wird der Benutzer ermutigt, die Störung mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:

- Orientieren oder verschieben Sie die Empfangsantenne.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an einem anderen Stromkreis an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Konsultieren Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker für Hilfe.

Warnung Innovation, Wissenschaft und wirtschaftliche Entwicklung Kanada (ISED)

Dieses Gerät entspricht den von Innovation, Science and Economic Development Canada lizenzbefreiten RSS-Standards. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) Dieses Gerät muss jegliche Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die eine unerwünschte Funktionsstörung verursachen könnten.

Le présent appareil est conforme aux Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) applicables aux appareils radioexempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC-RF-Strahlenexposition und SAR-Erklärungen

Dieses Gerät wurde auf die Einhaltung der Specific Absorption Rate (SAR) am Körper getestet. Das Funkmodul wurde im Rahmen des FCC Bulletin OET 65C (01-01) bewertet und als konform mit den Anforderungen der CFR 47 Abschnitte 2.1093 und 15.247 (b) (4) befunden, die die RF-Exposition von Hochfrequenzgeräten betreffen. Dieses Modell erfüllt die geltenden staatlichen Anforderungen für die Exposition gegenüber Radiofrequenzwellen. Die von der FCC festgelegte SAR-Grenze beträgt 1,6 W/kg.

Drahtlose Kommunikationsausrüstung

Drahtlose Kommunikationsgeräte wie drahtlose Heimnetzwerkgeräte, Mobiltelefone, schnurlose Telefone und deren Basisstationen sowie Walkie-Talkies können dieses Gerät beeinflussen und sollten mindestens 15 cm Abstand vom Gerät aufbewahrt werden.

Begrenzung der beabsichtigten Nutzung, Dritte und Datenverlust

- PRC-Salttillo gewährt keine Funktionalität dieses spracherzeugenden Geräts außerhalb der ausdrücklichen Garantie für die beabsichtigte Nutzung der Spracherzeugung. PRC-Salttillo übernimmt keine Garantie für Drittanbieter-Software und haftet auch nicht für Verletzungen, Schäden oder Ansprüche, die sich aus der Funktion oder Fehlfunktion von Drittanbiertechologien, Websites, Produkten und Software ergeben. Weitere Anwendungen können weitere klinische Untersuchungen erfordern, die über den Rahmen einer Bewertung für Spracherzeugungsgeräte hinausgehen.

- PRC-Salttillo übernimmt keine Verantwortung für etwaige Verluste oder Ansprüche Dritter, die durch die Nutzung dieses Produkts entstehen können.
- PRC-Salttillo übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch die Löschung von Daten infolge von Fehlfunktionen verursacht werden, Reparaturen oder Batterieaustausch. Sichern Sie alle wichtigen Daten auf anderen Medien (Computern), um sich vor deren Verlust zu schützen.

Vorgesehener Zweck des Geräts

Das Gerät ist ein Spracherzeugungsgerät, das die Kommunikation für Personen mit Sprach- oder Sprachstörungen unterstützt. Dieses Gerät und seine Sprachprogramme ermöglichen es dem Nutzer, ein Gespräch zu beginnen, Informationen zu suchen, Meinungen zu äußern und Gefühle auszutauschen. Je nach Modell kann es handgehalten, mit einem Tischstand verwendet oder an einem Rollstuhl befestigt werden; und kann über den Touchscreen, ein verfügbares Eye-Tracking-System oder Head-Tracking-System oder verschiedene verfügbare Schalter-Zubehörteile genutzt werden. Das Gerät enthält in keiner Weise medizinische Substanzen, menschliches Blut oder Plasmaderivate und wird auch nicht aus tierischem Gewebe hergestellt.

Indikationen und Kontraindikationen

Indikation: Das Gerät ist ein spracherzeugendes Gerät, das die Kommunikation für Personen mit Sprach- oder Sprachstörungen unterstützt.

Kontraindikation: Dieses Gerät ist nicht als Notrufgerät oder alleinige Kommunikationshilfe gedacht.

Bestehende Anwendungsrisiken

Bestehende Anwendungsrisiken sind nicht bekannt.

Erwartete Einsatzzeit

Die erwartete Lebensdauer des Geräts, des Batterieladegeräts und des Zubehörs beträgt fünf Jahre. Wenn Sie Ihr Gerät, Ihr Batterieladegerät oder Ihr Zubehör entsorgen, entsorgen Sie diese bitte gemäß Ihren örtlichen, staatlichen und/oder ländlichen Gesetzen zum elektronischen Recycling.

Vorgesehene Betreiber

Die Person, die das Gerät zur Kommunikation nutzt, der Kommunikationspartner und/oder die Person, die die Geräteeinstellungen ändert, Softwaredateien pflegt usw., sind die vorgesehenen Bediener des Geräts. Die Bilder und Texte im Handbuch helfen diesen Bedienern, die vorgesehene Nutzung des Geräts zu erreichen.

Erwartete Position der Bediener

Im normalen Gebrauch wird erwartet, dass sich das Gerät innerhalb von 30 bis 50 cm vom Körper der Person befindet. Die Entfernung variiert je nachdem, ob das Gerät handgehalten oder auf einem Rollstuhl oder Tisch montiert ist.

Besondere Fähigkeiten, Ausbildung oder Wissen erforderlich

Für den Betrieb oder die Wartung des Geräts sind keine besonderen Fähigkeiten oder Ausbildung erforderlich. Die Bilder und Texte in diesem Dokument helfen den Bedienern, das Wissen zu erwerben, um die vorgesehene Nutzung des Geräts zu erreichen.

Gebrauchsanweisungen

- Alle Funktionen des Geräts sind für den Benutzer sicher zugänglich. Für beste Ergebnisse folgen Sie den Anweisungen im Handbuch.
- Es ist nicht nötig, das Gerät oder den Verstärker bei täglicher Nutzung auszuschalten. Es wird empfohlen, das Gerät einmal pro Woche neu zu starten und täglich in den Ruhezustand zu versetzen.
- Um einen schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit dem Gerät zu melden, wenden Sie sich bitte an PRC-Salttillo und Ihre nationale Behörde. Informationen zur Reinigung finden Sie im Benutzerhandbuch.

Lagerungsanweisungen

Wenn Sie das Gerät über längere Zeit einlagern müssen, schalten Sie das Gerät und den Verstärker aus. Geräte im Lager müssen alle sechs Monate geladen werden.

Software-Compliance

Drahtlose Kommunikationsausrüstung

Drahtlose Kommunikationsgeräte wie drahtlose Heimnetzwerkgeräte, Mobiltelefone, schnurlose Telefone und deren Basisstationen sowie Walkie-Talkies können das Gerät beeinflussen, auf dem die Software läuft, und sollten mindestens fünfzehn (15) Zentimeter vom Gerät entfernt aufbewahrt werden.

Begrenzung der beabsichtigten Nutzung, Dritte und Datenverlust

- PRC-Salttillo gewährt keine Funktionalität der Software außerhalb der ausdrücklichen Garantie für die beabsichtigte Nutzung der Sprachgenerierung. PRC-Salttillo übernimmt keine Garantie für Drittanbieter-Software und haftet auch nicht für Verletzungen, Schäden oder Ansprüche, die sich aus der Funktion oder Fehlfunktion von Drittanbiertertechnologien, Websites, Produkten und Software ergeben. Weitere Anwendungen können weitere klinische Untersuchungen erfordern, die über den Rahmen einer Bewertung für Spracherzeugungsgeräte hinausgehen.
- PRC-Salttillo übernimmt keine Verantwortung für etwaige Verluste oder Ansprüche durch Dritte, die durch die Nutzung dieser Software entstehen können.
- PRC-Salttillo übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch die Löschung von Daten infolge eines Softwarefehlers entstehen. Sichern Sie alle wichtigen Daten auf anderen Medien (zum Beispiel einem Computer), um sich vor deren Verlust zu schützen.

Vorgesehener Zweck der Software

Die Software verbessert die Kommunikation für Personen mit Sprach- und Sprachstörungen. Die Sprachprogramme geben dem Nutzer die Möglichkeit, ein Gespräch zu beginnen, Informationen zu suchen, Meinungen zu äußern und Gefühle auszutauschen. Die Software wird über einen Touchscreen, ein Eye-Tracking-Modul, ein Head-Tracking-Modul oder verschiedene verfügbare Zubehörteile wie Tasten genutzt.

Indikationen und Kontraindikationen

Indikation: Die Software verbessert die Kommunikation für Personen mit Sprach- oder Sprachstörungen.

Kontraindikation: Die Software ist nicht für Notrufe oder als alleiniges Kommunikationsmittel gedacht.

Bestehende Anwendungsrisiken

Bestehende Anwendungsrisiken sind nicht bekannt.

Erwartete Einsatzzeit

Die Software wird kontinuierlich aktualisiert. Die Lebensdauer der Dienstzeit hängt von der Hardware ab, auf der sie läuft.

Vorgesehene Betreiber

Die Person, die die Software zur Kommunikation nutzt, der Kommunikationspartner und/oder die Person, die Softwareeinstellungen ändert, Softwaredateien pflegt usw., sind die vorgesehenen Bediener des Geräts.

Besondere Fähigkeiten, Ausbildung oder Wissen erforderlich

Für die Nutzung der Software sind keine besonderen Fähigkeiten oder Schulungen erforderlich.

Gebrauchsanweisungen

- Alle Funktionen der Software sind für den Benutzer sicher zugänglich. Für beste Ergebnisse folgen Sie den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Um einen schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit der Software zu melden, wenden Sie sich an PRC-Salttillo und Ihre nationale Behörde.

Internationale Kontaktinformationen

Herstellerin
Prentke Romich Company
1022 Heyl Rd
Wooster, OH 44691
USA
Tel.: +1 330 262-1984 · +1 800 262-1984
Fax: +1 330 262-4829
info@prentrom.com
prc-salttillo.com/

EU-Bevollmächtigter
Prentke Romich GmbH
Karthäuserstr. 3
D-34117 Kassel
Germany
Tel.: +49 (0) 561 7 85 59-0
Fax: +49 (0) 561 7 85 59-29
info@prentke-romich.de
prentke-romich.de/

EU-Importeur
Prentke Romich GmbH
Karthäuserstr. 3
D-34117 Kassel
Germany
Tel.: +49 (0) 561 7 85 59-0
Fax: +49 (0) 561 7 85 59-29
info@prentke-romich.de
prentke-romich.de/

Verantwortliche Person und Importeur im Vereinigten Königreich
Liberator Ltd
Glenside Business Park
West Pinchbeck, Spalding, Lincolnshire
PE11 3SA
United Kingdom
Tel.: +44 (0) 1733 370 470
Fax: +44 (0) 1476 552 473
info@liberator.co.uk
liberator.co.uk/

Bevollmächtigter Vertreter in Australien
Liberator Pty Ltd
Suite 1.02, Level 1, 8 Parkview Drive
Sydney Olympic Park NSW 2127
Australia
Tel.: +61 (0) 8 8211 7766
info@liberator.net.au
liberator.net.au/

Schweizer Bevollmächtigter
Inspera GmbH
Thunstrasse 64 | CH-3110 Münsingen
Switzerland
Tel.: +41 31 819 74 60
Mobile: +41 79 435 53 09
mail@inspera.ch
inspera.ch/

Schweizer Importeur
Active Communication AG
Sumpfstrasse 28 | CH-6312 Steinhausen
Switzerland
paraplegie.ch/activecommunication/de/

Softwarelizenzvereinbarung für die iOS-App:

Prentke Romich Company, firmierend als PRC-Salttillo, als Lizenzgeber (zusammen „PRC-Salttillo“, „wir“, „uns“ oder „unser“)

UND

Jede Person, jedes Unternehmen oder jede Organisation („Sie“ oder „Nutzer“), die als Lizenznehmer gemäß den Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung („Vereinbarung“) eine iOS-Softwareanwendung von PRC-Salttillo, wie beispielsweise TouchChat®, LAMP Words for Life®, Dialogue® AAC oder Unity® AAC (jeweils eine „Anwendung“), auf einem iOS-Gerät („Gerät“) implementiert oder in irgendeiner Weise nutzt.

Sie erklären sich mit den Bedingungen dieser Vereinbarung einverstanden, wenn Sie die Anwendung herunterladen, installieren, kopieren, ausführen oder auf andere Weise implementieren, verwalten oder nutzen. Wenn Sie den Bedingungen dieser Vereinbarung nicht zustimmen, haben Sie nicht das Recht, diese zu nutzen.

Sowohl PRC-Salttillo als auch Sie erkennen an, dass diese Vereinbarung zwischen Ihnen und PRC-Salttillo geschlossen wird und dass keine andere Partei an dieser Vereinbarung beteiligt ist, insbesondere kein Drittanbieter für das App-Hosting wie Apple, Inc. („Apple“). PRC-Salttillo trägt die alleinige Verantwortung für den Inhalt der Anwendung.

Eigentums- und geistige Eigentumsrechte

Die Anwendung ist Eigentum von PRC-Salttillo und durch alle anwendbaren Eigentums- und Urheberrechtsgesetze geschützt. Mit Ausnahme der Ihnen durch diese Vereinbarung ausdrücklich gewährten Lizenz behält PRC-Salttillo alle Rechte, Titel und Ansprüche an der Anwendung und dem gesamten damit verbundenen geistigen Eigentum, einschließlich aller Patente, Urheberrechte, Marken, Handelsnamen, Geschäftsgeheimnisse und aller anderen Eigentumsrechte an oder im Zusammenhang mit der Anwendung. PRC-Salttillo behält sich das ausschließliche Recht vor, die Nutzung, Vervielfältigung, Lizenzierung und/oder Verbreitung der Anwendung zu kontrollieren, einschließlich des Rechts, anderen die Nutzung, Vervielfältigung, Lizenzierung und/oder Verbreitung der Anwendung zu untersagen. Vollständige Informationen zu den Markenzeichen finden Sie unter prc-salttillo.com. Sollten Dritte Ansprüche wegen der Verletzung von geistigen Eigentumsrechten durch die Anwendung oder deren Besitz und Nutzung geltend machen, liegt die alleinige Verantwortung für die Untersuchung, Abwehr, Schlichtung und Erledigung dieser Ansprüche bei PRC-Salttillo und nicht bei Apple.

Produktlizenz

Allgemeine Lizenzerteilung: PRC-Salttillo gewährt Ihnen als Benutzer eine beschränkte, nicht ausschließliche und nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung der Anwendung gemäß den in dieser Vereinbarung festgelegten Bedingungen. Im Sinne dieser Vereinbarung ist ein Benutzer ein Kommunikator oder ein Kommunikationspartner.

Lizenztypen:

Kommunikator: Im Sinne dieser Vereinbarung ist ein Kommunikator jede Person, welche die Software nutzt und kein Kommunikationspartner ist; dies schließt insbesondere Personen ein, welche die Anwendung zur Kommunikation und/oder für Zwecke der Barrierefreiheit verwenden. Für einen Kommunikator kann die Anwendung auf bis zu zehn (10) Geräten gleichzeitig installiert und aktiviert werden, jedoch nur zur Nutzung durch Sie oder Ihren Kommunikationspartner.

Kommunikationspartner oder -agenten: Im Sinne dieser Vereinbarung gilt als Kommunikationspartner jede natürliche oder juristische Person, welche die Software lediglich zur Unterstützung der Nutzung durch einen Nutzer der Unterstützten Kommunikation (UK) verwendet, sowie alle professionellen UK-Berater, Fachberater oder IT-Personal eines UK-Dienstleisters oder einer Institution.

Kommunikationspartner können:

- a. die Anwendung auf bis zu zehn (10) Geräten gleichzeitig zu Zwecken der UK-Evaluierung und/oder Schulung durch Sie installieren und aktivieren, sofern diese Endgeräte hauptsächlich durch Sie selbst verwendet werden
- b. die Lizenz mit einem weiteren Kommunikator teilen; der Kommunikator und der Kommunikationspartner können die Lizenzen je nach Bedarf zuteilen

Lizenzbedingungen

Durch die Nutzung des Produkts akzeptieren Sie die folgenden Bedingungen:

- a. Außer unter den oben ausdrücklich aufgeführten Bedingungen oder sofern Ihnen durch eine gesonderte Lizenz von PRC-Salttillo eine ausdrückliche Genehmigung erteilt wurde, dürfen Sie die Software nicht anders als unter den in dieser Vereinbarung ausdrücklich aufgeführten Bedingungen nutzen oder anderen die Nutzung gestatten.
- b. Wenn Sie die Software ohne ausdrückliche Genehmigung von PRC-Salttillo herunterladen oder anderweitig auf einem Gerät zur Verfügung stellen, auf dem die Software weiterverkauft, vertrieben oder anderweitig in den Handel gebracht wird, verstoßen Sie gegen diese Lizenz. Sie werden hiermit darauf hingewiesen, dass solche Handlungen rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen und Sie schadenersatzpflichtig machen können.
- c. PRC-Salttillo ist Inhaber aller gesetzlichen Rechte, Titel und Ansprüche an der Anwendung, einschließlich aller damit verbundenen Rechte an geistigem Eigentum, wie sie in dieser Vereinbarung definiert sind.
- d. Die Eigentumsrechte an der Anwendung werden nicht übertragen; falls Sie die Anwendung unter Verletzung dieser Bedingungen an eine andere Person übertragen, sind Sie für jeden Verstoß gegen diese Lizenzbestimmungen durch einen nachfolgenden Nutzer verantwortlich.
- e. Es ist Ihnen untersagt, die Anwendung zu kopieren (außer zu Sicherungszwecken), zu verkaufen, weiterzuverbreiten, zu verpfänden, unterzulizenzieren, zu verleihen, zu vermieten, zu modifizieren, zu übersetzen, anzupassen, zu entschlüsseln, zurückzuentwickeln (Reverse Engineering), zu dekompileieren, zu disassemblieren, den Quellcode abzuleiten oder dies zu versuchen, abgeleitete Werke der Anwendung zu erstellen, Teile der Anwendung mit anderer Software zu kombinieren oder zu bündeln oder Anwendungen, Software oder Geräte zu verbreiten, die einen Teil der Anwendung enthalten.
- f. Es ist Ihnen untersagt, Markenzeichen, Handelsnamen, Logos, Patent- oder Urheberrechtshinweise oder Kennzeichnungen von PRC-Salttillo von irgendeinem Teil der Anwendung zu entfernen.
- g. Es ist Ihnen untersagt, die Anwendung an eine andere Partei zu übertragen, zu vermieten oder zu verleasen, sofern dies nicht an anderer Stelle in dieser Vereinbarung vorgesehen ist; zudem dürfen Sie die Anwendung auf keinem Gerät nutzen, das sich nicht in Ihrem Eigentum oder unter Ihrer Kontrolle befindet.
- h. Es ist Ihnen untersagt, medizinische Sprachausgabegeräte, auf denen die Software installiert ist, zu entwickeln, zu verkaufen, zu vertreiben oder Erstattungen dafür anzunehmen (es sei denn, Sie sind durch eine gesonderte schriftliche Vereinbarung mit PRC-Salttillo als Wiederverkäufer dazu berechtigt).

Diese Vereinbarung regelt sämtliche von PRC-Salttillo zur Verfügung gestellten Updates oder Upgrades der Applikation, die das ursprüngliche Produkt ersetzen oder ergänzen. Hiervon ausgenommen sind Aktualisierungen, die unter einer separaten Lizenz veröffentlicht werden; in einem solchen Fall gelten die Bedingungen der beigefügten Lizenz. Apple ist nicht verpflichtet, Ihnen Updates, Wartungs- oder Supportleistungen für die Anwendung bereitzustellen.

Datenschutz und Einwilligung zur Nutzung von Informationen

Die Anwendung benötigt weder Anmeldung noch Login oder sonstige Informationen zum Betrieb. Die Anwendung sammelt nur Informationen, die Sie freiwillig angeben, wenn Sie ein Konto erstellen. Wenn Sie ein Konto erstellen, müssen die angegebenen Informationen die des Gerätebesitzers sein.

Um den Produktsupport, die Produktentwicklung und -verbesserung sowie andere Dienstleistungen für Sie zu erleichtern, erklären Sie sich damit einverstanden, dass PRC-Salttillo oder von PRC-Salttillo autorisierte Dritte Cookies, Web-Beacons und andere Analysetechnologien verwenden dürfen, um nicht personenbezogene technische und damit zusammenhängende Informationen bezüglich Ihres Geräts zu erheben, zu nutzen, zu speichern und zu übermitteln; dies umfasst die eindeutige Geräte-ID, die IP-Adresse, den geografischen Standort, Marke und Modell des Geräts, das Betriebssystem, Software und Anwendungen, einschließlich der Nutzungsdaten der Anwendungen. Darüber hinaus können solche Parteien nicht personenbezogene Sitzungsdaten, Browserkennungen, Mobilfunkanbieterinformationen sowie Online- und Anwendungsnutzungsmetriken, Statistiken oder Analysen erfassen, speichern, verwenden und übermitteln.

PRC-Salttillo erhebt keine Daten, die Ihre geschützten Gesundheitsinformationen (PHI) enthalten. Als PHI (geschützte Gesundheitsinformation) gelten alle Informationen über den Gesundheitszustand, die Gesundheitsversorgung oder die Bezahlung von Gesundheitsleistungen. Eine Datenübermittlung durch den Nutzer der Applikation erfolgt ausschließlich über die optionalen Online-Abonnement-Services von PRC-Salttillo (z. B. Realize, iShare und/oder iSharePRC), die ergänzend zur Applikation genutzt werden können, oder sofern kein Widerspruch gegen die Erhebung anonymisierter Telemetriedaten eingelegt wurde. PRC-Salttillo ist dem Schutz Ihrer Privatsphäre und Sicherheit verpflichtet. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter prc-salttillo.com/privacy-policy. Unsere Datenschutzrichtlinie ist durch diesen Verweis Bestandteil dieser Vereinbarung.

Beendigung

Sie nehmen zur Kenntnis, dass PRC-Salttillo den Zugriff auf die Anwendung einschränken, die Anwendung einstellen oder verändern darf. Dies kann aus jedem beliebigen Grund geschehen, insbesondere wenn gegen Bestimmungen dieses Vertrags verstoßen wird. Bei Beendigung der Nutzung müssen Sie sämtliche Kopien der Anwendung sowie alle Informationen und Daten, die Sie aus der Anwendung heruntergeladen haben, vernichten.

Zusätzliche Gewährleistungsausschlüsse

BITTE BEACHTEN SIE DIE FOLGENDEN WICHTIGEN GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLÜSSE:

DIE ANWENDUNG WIRD „WIE BESEHEN“ UND OHNE JEGliche AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG BEREITGESTELLT. JEGliche GEWÄHRLEISTUNG, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, WIRD VON PRC-SALTILLO AUSGESCHLOSSEN. DIES UMFASST INSBESONDERE DIE GEWÄHRLEISTUNG DER RECHTSMÄNGELFREIHEIT, DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT (MARKTGÄNGIGKEIT), DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DER SYSTEMKOMPATIBILITÄT, DER DATENSICHERHEIT, DER RICHTIGKEIT SOWIE DER NICHTVERLETZUNG VON SCHUTZRECHTEN DRITTER.

WEDER PRC-SALTILLO NOCH EINES UNSERER VERBUNDENEN UNTERNEHMEN NOCH UNSERE ODER DEREN JEWEILIGEN LIZENZGEBER, LIZENZNEHMER, DIENSTLEISTER ODER LIEFERANTEN GARANTIEREN, DASS DIE ANWENDUNG UNUNTERBROCHEN ODER FEHLERFREI FUNKTIONIERT ODER DASS FEHLER BEHOBEN WERDEN.

DAS HERUNTERLADEN UND DIE VERWENDUNG DER APPLIKATION GESCHEHEN AUF EIGENE GEFAHR. SIE SIND AUSSCHLIESSLICH SELBST FÜR JEGliche SCHÄDEN AN IHRER HARDWARE ODER FÜR DATENVERLUSTE VERANTWORTLICH, DIE INFOLGE DER NUTZUNG DER APPLIKATION EINTRETEN KÖNNTEN.

PRC-SALTILLO SOWIE DEREN TOCHTERGESELLSCHAFTEN, LIZENZGEBER UND ZULIEFERER ÜBERNEHMEN KEINE GEWÄHRLEISTUNG ODER ZUSICHERUNG BEZÜGLICH DER VERWENDUNG DER APPLIKATION ODER DER DARAUS RESULTIERENDEN ERGEBNISSE. DIES GILT INSBESONDERE IM HINBLICK AUF DIE RICHTIGKEIT, PRÄZISION UND VERLÄSSLICHKEIT DER BEREITGESTELLTEN INHALTE UND FUNKTIONEN.

SOWEIT NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG, ÜBERNIMMT APPLE KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNGSVERPFLICHTUNG IN BEZUG AUF DIE ANWENDUNG, UND JEDLICHE ANSPRÜCHE, VERLUSTE, HAFTUNGEN, SCHÄDEN, KOSTEN ODER AUSGABEN, DIE AUF DIE NICHT-EINHALTUNG EINER IM RAHMEN DIESER VEREINBARUNG GEGEBENEN GEWÄHRLEISTUNG (FALLS VORHANDEN) ZURÜCKZUFÜHREN SIND, FALLEN IN DIE ALLEINIGE VERANTWORTUNG VON PRC-SALTILLO. IN EINIGEN RECHTSORDNUNGEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG STILLSCHWEIGENDER GEWÄHRLEISTUNGEN ODER DER GESETZLICHEN RECHTE VON VERBRAUCHERN NICHT ZULÄSSIG; DAHER TREFFEN EINIGE ODER ALLE DER OBEN GENANNTEN AUSSCHLÜSSE UND BESCHRÄNKUNGEN MÖGLICHERWEISE NICHT AUF SIE ZU.

Zusätzliche Haftungsbeschränkung

SIE VERSTEHEN AUSDRÜCKLICH UND ERKLÄREN SICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS PRC-SALTILLO SOWIE UNSERE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, LIEFERANTEN UND LIZENZGEBER NICHT FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, FOLGESCHÄDEN, VERSCHÄRFTEN SCHADENSERSATZ ODER STRAFSCHADENSERSATZ ODER SONSTIGE SCHÄDEN JEDLICHER ART HAFTEN; DIES UMFASST, OHNE DARAUF BESCHRÄNKT ZU SEIN, SCHÄDEN AUS ENTGANGENEM GEWINN, GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERTVERLUST, NUTZUNGS-AUSFALL, DATENVERLUST ODER ANDERE IMMATERIELLE VERLUSTE (SELBST WENN PRC-SALTILLO AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE), DIE AUS (A) DER NUTZUNG ODER DER UNFÄHIGKEIT ZUR NUTZUNG DER ANWENDUNG ODER (B) DEN KOSTEN FÜR DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZGÜTERN UND -DIENSTLEISTUNGEN INFOLGE DER NUTZUNG DER ANWENDUNG ODER ETWAIGER MÄNGEL AN DIESER ENTSTEHEN ODER DARAUS RESULTIEREN. DIE GESAMTHAFTUNG VON PRC-SALTILLO FÜR SÄMTLICHE SCHÄDEN, VERLUSTE ODER RECHTSANSPRÜCHE AUS ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DIESER APPLIKATION – GLEICH AUS WELCHEM RECHTSGRUND, OB VERTRAGLICH, AUS DELIKT (INSBESONDERE FAHRLÄSSIGKEIT) ODER AUS SONSTIGEN GRÜNDEN – IST DER HÖHE NACH AUF DEN VON IHNEN FÜR DIE APPLIKATION ENTRICHTETEN KAUFPREIS BEGRENZT. FALLS SIE MIT EINEM TEIL DER ANWENDUNG ODER MIT EINER BESTIMMUNG DIESER VEREINBARUNG UNZUFRIEDEN SIND, BESTEHT IHR EINZIGES UND AUSSCHLIESSLICHES RECHTSMITTEL IN DER EINSTELLUNG DER NUTZUNG DER ANWENDUNG.

Export- und sonstige Gesetze

Sie dürfen die Anwendung nicht unter Verstoß gegen Bundes-, Landes- oder sonstige anwendbare Gesetze verwenden. Ohne die vorstehenden Ausführungen einzuschränken, unterliegt die Anwendung möglicherweise den Exportkontrollgesetzen der Vereinigten Staaten, und Sie stimmen zu, alle diese Gesetze, die jetzt oder künftig gelten, strikt einzuhalten. Unbeschadet weitergehender Bestimmungen ist der Export oder Reexport der Applikation untersagt: (a) in Länder, die US-Embargos unterliegen, sowie (b) an natürliche oder juristische Personen, die in den Sanktionslisten des US-Finanzministeriums (Specially Designated Nationals) oder des US-Handelsministeriums (Denied Persons List oder Entity List) aufgeführt sind. Durch die Nutzung der Anwendung versichern Sie, dass Sie sich nicht in einem solchen Land befinden und nicht auf einer solchen Liste stehen. Sie stimmen außerdem zu, dass Sie diese Produkte nicht für Zwecke verwenden werden, die nach US-amerikanischem Recht verboten sind, insbesondere nicht für die Entwicklung, Konstruktion, Herstellung oder Produktion von Raketen, nuklearen, chemischen oder biologischen Waffen.

Drittbegünstigte

Apple ist ein Drittbegünstigter dieser Vereinbarung. Mit Ihrer Annahme dieser Vereinbarung hat Apple das Recht (und es wird davon ausgegangen, dass Apple dieses Recht angenommen hat), diese Vereinbarung Ihnen gegenüber als Drittbegünstigter dieser Vereinbarung in Bezug auf die Anwendung durchzusetzen.

Produktfragen, Kommentare, Reklamationen und Kontaktinformationen.

Die Zuständigkeit für die Bearbeitung von Anfragen, Anmerkungen oder Rechtsansprüchen in Bezug auf die Applikation sowie deren Nutzung liegt ausschließlich bei uns und nicht bei Apple. Dies umfasst insbesondere, jedoch nicht abschließend: (a) Produkthaftungsansprüche; (b) jegliche Ansprüche daraus, dass die Anwendung geltenden gesetzlichen oder regulatorischen Anforderungen nicht entspricht; und (c) Ansprüche aus Verbraucherschutzgesetzen oder ähnlichen Rechtsvorschriften. Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an PRC-Salttillo unter:

PRC-Salttillo
1022 Heyl Rd
Wooster, OH 44691
Attn: Customer Service
E-Mail: info@aacapps.com

Entschädigung

Sie erklären sich damit einverstanden, uns und unsere verbundenen Unternehmen sowie unsere und deren leitende Angestellte, Direktoren, Mitarbeiter, Aktionäre, Bevollmächtigte und Vertreter schadlos zu halten, von Haftung freizustellen und nach unserer Wahl zu verteidigen gegen sämtliche Ansprüche Dritter, Haftungen, Schäden und/oder Kosten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf angemessene Anwaltsgebühren und Auslagen), die aus Ihrer unsachgemäßen Nutzung der Anwendung, Ihrem Verstoß gegen diese Vereinbarung oder der Verletzung von geistigem Eigentum oder anderen Rechten einer natürlichen oder juristischen Person durch Sie oder einen anderen Nutzer Ihres Kontos resultieren.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Dieser Vertrag unterliegt den Gesetzen des Staates Ohio und ist nach diesen auszulegen, ohne dass die Grundsätze des Kollisionsrechts Anwendung finden. Sie erklären sich damit einverstanden, dass alle Rechtsstreitigkeiten, die sich aus Ihrer Nutzung dieser Anwendung oder dieser Vereinbarung ergeben oder damit in Zusammenhang stehen, ausschließlich vor den staatlichen oder Bundesgerichten im Wayne County im Bundesstaat Ohio verhandelt werden, und Sie unterwerfen sich hiermit der persönlichen Gerichtsbarkeit dieser Gerichte für die Zwecke der Verhandlung solcher Rechtsstreitigkeiten.

Verzicht bei Vertragsverletzung

Unser Versäumnis, die Erfüllung einer Bestimmung oder eines Teils einer Bestimmung zu verlangen, berührt nicht unser Recht, die Erfüllung zu einem späteren Zeitpunkt zu verlangen oder durchzusetzen. Ebenso wenig gilt der Verzicht eines Nutzers auf die Geltendmachung eines Verstoßes gegen eine Bestimmung dieser Vereinbarung als Verzicht auf die Geltendmachung eines späteren Verstoßes durch Sie oder einen anderen Nutzer.

Inhalte von Drittanbietern

Die Nutzung einer Anwendung, die lizenzierten Inhalt Dritter enthält oder Zugriff darauf gewährt (einschließlich der Tobii Dynavox PCS®-Symbolbibliothek, der News2You SymbolStix®-Symbolbibliothek, METACOM-Symbolen, im Folgenden SYMBOLE genannt, oder Almagu-Stimmen) oder eines Teils davon, unterliegt zusätzlich zu den übrigen Bedingungen dieser Vereinbarung den folgenden Bestimmungen. Die mit der Anwendung abgerufenen Symbole dürfen nicht zur Erstellung von Materialien in gedruckter oder elektronischer Form verwendet werden, weder für Kommunikations- noch für Unterrichtszwecke, außer durch einen einzelnen Benutzer in Verbindung mit der Nutzung dieser Anwendung.

PCS-Symbole dürfen nur in Boardmaker-Dateiformaten mit der Dateieindung „.bm2“, „.zip“ oder „.zbp“ weitergegeben werden. SymbolStix-Symbole dürfen nur für den persönlichen Gebrauch weitergegeben werden, wenn ein SymbolStix Prime-Abonnement erworben wurde. Die Weitergabe von Inhalten oder Materialien unter Verwendung von SYMBOLEN in anderen Formaten (z. B. .pdf oder PDF, .ppt oder PowerPoint, .doc oder WORD oder ähnlichen Softwareformaten, die zur Anzeige und/oder Übertragung von Text und/oder Bildern verwendet werden) ist nicht gestattet.

METACOM Symbole © Annette Kitzinger. Vervielfältigungen zur automatisierten Analyse von METACOM-Symbolen zur Informationsgewinnung (Text- und Data-Mining) sind nicht gestattet und bleiben dem Urheberrechtsinhaber vorbehalten.

Benutzer dieser Anwendung dürfen SYMBOLE weder vermieten, verleasen noch verleihen oder sie an Online-Dienste oder kommerzielle Hosting-Dienste weitergeben. Es ist den Nutzern nicht gestattet, Rechte an den Symbolen unterzulizenzieren, abzutreten oder zu übertragen oder die Symbole, zu denen sie Zugriff haben, ganz oder teilweise auf einen Computer oder ein anderes Gerät zu kopieren.

Die Anwendung kann Zugriff auf Almagu-Stimmen ermöglichen. The Voice Keeper™ ist eine Marke von Almagu. Alle Rechte vorbehalten. Almagu-Stimmen können Aufnahmen aus dem VCTK-Korpus enthalten (Yamagishi, Junichi; Veaux, Christophe; MacDonald, Kirsten). (2019). CSTR VCTK-Korpus: Englischer Mehrsprecherkorpus für das CSTR Voice Cloning Toolkit (Version 0.92), [Sound]. Universität von Edinburgh. The Centre for Speech Technology Research (CSTR) (doi.org/10.7488/ds/2645). Dieser Korpus unterliegt der Creative Commons Lizenz: Attribution 4.0 International (creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode), deren Bestimmungen integraler Bestandteil dieses Vertrages sind.

Anwaltskosten

In jedem Verfahren, das zur Durchsetzung einer Bestimmung dieses Vertrags eingeleitet wird, hat die obsiegende Partei, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, Anspruch auf Erstattung angemessener Anwaltskosten zusätzlich zu allen anderen verfügbaren Rechtsbehelfen.

DOC100530